

УТВЕРЖДЕНА

УТВЕРЖДАЮ

Приказом Росздравнадзора

Генеральный директор
ООО Пауль Хартманн

От _____ 2011 г. № _____

Калабин Ю.В.

_____ 2011 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

Одежда операционная одноразовая стерильная и нестерильная
(наименование изделия медицинского назначения)

1. Одежда операционная одноразовая:

Назначение:

Защита медицинского персонала во время проведения диагностических процедур

1. Технические характеристики

Материал Фолиодресс Комфорт Бейсик	Нетканый воздухопроницаемый полипропиленовый SMMS материал: Спанбонд, Мелтблаун, Мелтблаун, спанбонд Манжета: 100%полиэстер.
Фолиодресс Комфорт Перфект	Нетканый воздухопроницаемый полипропиленовый SMMS материал: Спанбонд, Мелтблаун, Мелтблаун, спанбонд Манжета: 100%полиэстер.
Фолиодресс Комфорт Спешиал	Нетканый воздухопроницаемый полипропиленовый SMMS материал: Спанбонд, Мелтблаун, Мелтблаун, спанбонд Усиленная часть: непромокаемый Triac-материал Манжета: 100%полиэстер.
Фолиодресс Комфорт Урология	Нетканый воздухопроницаемый полипропиленовый SMMS материал: Спанбонд, Мелтблаун, Мелтблаун, спанбонд Рукава: нетканая, ламинированная пленка (PE/PP) Усиленная часть: полиэтиленовая пленка Манжета: 100%полиэстер.
Фолиодресс Комфорт Хай Риск	нетканая, ламинированная пленка (PE/PP) Манжета: 100%полиэстр Нити: 100%полиэстер.
Фолиодресс Протект Стандарт	Нетканый воздухопроницаемый полипропиленовый SMMS материал: Спанбонд, Мелтблаун, Мелтблаун, спанбонд Манжета: 100%полиэстер.
Фолиодресс Протект Реинфорсед	Нетканый воздухопроницаемый полипропиленовый SMMS материал: Спанбонд, Мелтблаун, Мелтблаун, спанбонд Усиленная часть: ламинированный полипропиленовый материал в передней части и рукава до уровня локтей Манжета: 100%полиэстер.
	Нетканый материал: PP - PE ламинация

Фолиодресс С Фолиодресс Сьюит Протек	Швейные нити: 100% PES. Нетканый воздухопроницаемый полипропиленовый SMMS материал: Спанбонд, Мелтблаун, Мелтблаун, Спанбонд
Технические характеристики: Устойчивость к проникновению жидкости: Фолиодресс Комфорт Бейсик	$\leq 39,1$ см H ₂ O
Фолиодресс Комфорт Перфект	$\leq 39,1$ см H ₂ O
Фолиодресс Комфорт Спешиал	$\leq 39,1$ см H ₂ O
Фолиодресс Комфорт Урология	$\leq 39,1$ см H ₂ O
Фолиодресс Комфорт Хай Риск	$\leq 39,1$ см H ₂ O
Фолиодресс Протект Стандарт	≤ 34 см H ₂ O
Фолиодресс Протект Реинфорсед	$\leq 133,9$ см H ₂ O
Фолиодресс С (плотность)	42 г/м^2
Фолиодресс Сьюит Протек (плотность)	38 г/м^2
Размеры	M, L, XL, XXL

2. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.

3. Подготовка к работе:

Обработать руки надлежащим образом, аккуратно вскрыть упаковку, надеть халат. После использования утилизировать согласно положению по утилизации медицинских отходов.

4. Правила хранения и использования:

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, месте, при температуре от 0°C до +25°C

5. Срок годности:

5 лет от даты производства, указанной на упаковке

Руководство по эксплуатации

Одежда операционная одноразовая стерильная и нестерильная:

- Фолиодресс Комфорт Бейсик
- Фолиодресс Комфорт Перфект
- Фолиодресс Комфорт Спешиал
- Фолиодресс Комфорт Урология
- Фолиодресс Комфорт Хай Риск
- Фолиодресс Протект Стандарт
- Фолиодресс Протект Реинфорсед
- Фолиодресс С
- Фолиодресс Сюит Протек

Использование:

Извлечь халат из упаковки. Развернуть халат, держа на вытянутых руках так, чтобы он не касался окружающих предметов и личной одежды. Взять за спинные части у воротника, повернуть внутренней стороной к себе, держать на уровне лица. Вдеть обе руки одновременно в рукава, подняв руки вверх и развести в стороны. Завязать завязки на рукавах самостоятельно. Подать концы пояса помощнику (помощник завязывает сзади завязки и пояс, не касаясь ни рук, ни халата).

После использования утилизировать согласно положению по утилизации медицинских отходов.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, месте, при температуре от 0°C до +25°C.

Транспортировка:

Особый способ транспортировки не предусмотрен.

Утилизация:

Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.



Продукты
и эксклюзивно
не имеет
52

