

1052 | 2023

Инструкция по применению

(User manual)

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

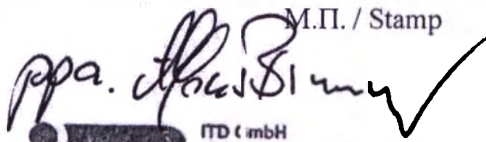
Стойка медицинская для аппаратуры в составе в вариантах исполнения с принадлежностями

РАЗРАБОТЧИК

ITD GmbH (Ай Ти Ди, ГмбХ) Sportplatzstr. 3, 84381 Johanniskirchen, Germany (Германия)

Утверждаю/ Approved by
ITD GmbH (Ай Ти Ди, ГмбХ)
Дата/Dated: 29/03/2023
(подпись/signature)

Ответственное лицо / Name Name of Responsible person
Mr. Alfons Brummer
М.П. / Stamp


 ITD GmbH
Sportplatzstraße 3
84381 Johanniskirchen
Tel.: +49 89 614425-0
Fax: +49 89 614425-200

UVZNr. 1052/2023

I hereby certify that the signature under this document was acknowledged by

Mr.

Alfons Brummer

born on 29.02.1960,

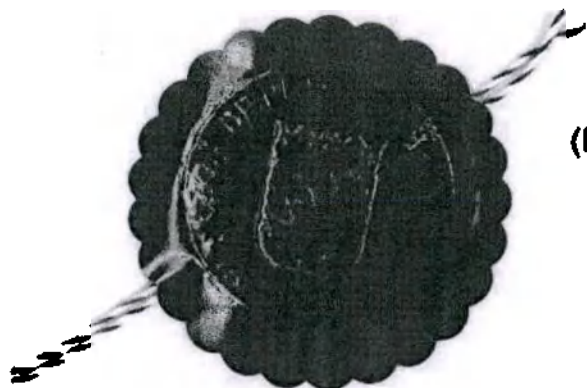
Bischof-Engilmar-Str. 16, 84347 Pfarrkirchen,

personally known to me,

**acting on behalf of ITD GmbH, Sportplatzstr. 3, 84381 Johanniskirchen, as its
company's director.**

**Upon my inspection of the commercial register on 31st of March, 2023, I further
certify that ITD GmbH is registered with the Municipal Court of Landshut
-Commercial Register- under No. HRB 4170 and that Mr. Alfons Brummer is
entitled to act as this company's legal representative.**

Pfarrkirchen, 31st of March, 2023



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Dr. Fahr'.

(Dr. Fahr, notary) ne

Оглавление

1. Наименование	3
2. Производитель	20
3. Назначение медицинского изделия.....	21
4. Классификация медицинского изделия	21
5. Общее описание медицинского изделия	22
6. Потенциальные потребители.....	27
7. Меры предосторожности	27
8. Требования к охране окружающей среды при применении медицинского изделия	29
9. Очистка, дезинфекция, стерилизация	29
10. Маркировка	30
11. Упаковка	37
12. Требования к монтажу и установке медицинского изделия.....	37
13. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия	39
14. Условия транспортировки и хранения.....	42
15. Срок годности	43
16. Утилизация	43
17. Гарантия изготовителя	43
18. Основные технические характеристики	44
19. Комплект поставки	109
20. Риски при применении медицинского изделия	110
21. Схема производственного процесса	110
22. Заявление производителя по ЭМС.....	111
23. Перечень международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие	116
24. Уполномоченный представитель производителя на территории РФ	117

1. Наименование

Стойка медицинская для аппаратуры в составе в вариантах исполнения с принадлежностями

1. Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart Economy:

- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Economy, 21U
- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Economy, 25U
- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Economy, 30U
- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Economy, 35U

Состав:

1. Профиль – 1 шт.
2. Колесная база Economy – 1 шт.
3. Трансформатор, 660VA – 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Держатель емкости, 145 мм - не более 10 шт.
2. Держатель емкости, 120 мм - не более 10 шт.
3. Держатель газового баллона - не более 10 шт.
4. Корзина, маленькая - не более 10 шт.
5. Держатель блока питания, 5U - не более 10 шт.
6. Держатель блока питания, 7U - не более 10 шт.
7. Держатель бутылки, 60 мм - не более 10 шт.
8. Держатель газового баллона, 15 кг - не более 10 шт.
9. Держатель газового баллона, 20 кг - не более 10 шт.
10. Держатель газового баллона, 50 кг - не более 10 шт.
11. Фиксированный держатель - не более 10 шт.
12. Вращающийся держатель - не более 10 шт.
13. Держатель педали - не более 10 шт.
14. Держатель оборудования, 16 мм - не более 10 шт.
15. Держатель оборудования, 18 мм - не более 10 шт.
16. Держатель кабеля, двойной - не более 10 шт.
17. Уголки крепления оборудования - не более 10 шт.
18. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 250мм - не более 10 шт.
19. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 250мм - не более 10 шт.
20. Держатель монитора одноплечевой, 3-10 кг, 300мм - не более 10 шт.
21. Держатель монитора одноплечевой, 8-14 кг, 300мм - не более 10 шт.
22. Держатель монитора одноплечевой, 3-10 кг, 400мм - не более 10 шт.
23. Держатель монитора одноплечевой, 8-14 кг, 400мм - не более 10 шт.
24. Ручка - не более 10 шт.
25. Держатель компьютера, 5 кг - не более 10 шт.
26. Держатель компьютера, 20 кг - не более 10 шт.
27. Держатель ноутбука - не более 10 шт.
28. Держатель бутылки, 5 кг - не более 10 шт.
29. Штатив инфузионный, раздвижной - не более 10 шт.
30. Держатель (рельса), 162 мм - не более 10 шт.
31. Держатель (рельса), 390 мм - не более 10 шт.
32. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 325мм - не более 10 шт.
33. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 325мм - не более 10 шт.

34. Держатель монитора с фронтальным креплением на колонне универсальный, 0-14 кг - не более 10 шт.
35. Держатель монитора с полкой для клавиатуры - не более 10 шт.
36. Держатель монитора с регулировкой по высоте - не более 10 шт.
37. Набор колес 100 мм - не более 10 шт.
38. Набор колес 100 мм, электропроводные - не более 10 шт.
39. Набор колес 125 мм, электропроводные - не более 10 шт.
40. Бампер - не более 10 шт.
41. Кабель-канал, 21U - не более 10 шт.
42. Кабель-канал, 23U - не более 10 шт.
43. Кабель-канал, 25U - не более 10 шт.
44. Кабель-канал, 30U - не более 10 шт.
45. Кабель-канал, 35U - не более 10 шт.
46. Кабель-канал, T-slots 21U - не более 10 шт.
47. Кабель-канал, T-slots 23U - не более 10 шт.
48. Кабель-канал, T-slots 25U - не более 10 шт.
49. Кабель-канал, T-slots 30U - не более 10 шт.
50. Кабель-канал, T-slots 35U - не более 10 шт.
51. Электрический ящик с замком, 2 кг - не более 10 шт.
52. Кабель - разветвители, 3 выхода - не более 10 шт.
53. Набор кабелей Economy, POAG - не более 10 шт.
54. Блок розеток, 3 разъема - не более 10 шт.
55. Полка - не более 10 шт.
56. Полка с ручкой сбоку - не более 10 шт.
57. Полка с ручкой - не более 10 шт.
58. Полка с подставкой для мыши - не более 10 шт.
59. Полка с ручкой и подставкой для мыши - не более 10 шт.
60. Набор ящиков - не более 10 шт.
61. Набор ящиков с замком - не более 10 шт.
62. Набор ящиков, с подставкой для мыши - не более 10 шт.
63. Набор ящиков, ручка сбоку - не более 10 шт.
64. Набор ящиков с одним отделением - не более 10 шт.
65. Набор ящиков с одним отделением, ручка сбоку - не более 10 шт.
66. Набор ящиков с двумя отделениями - не более 10 шт.
67. Набор ящиков с двумя отделениями и ручкой сбоку - не более 10 шт.
68. Ящик для клавиатуры с подставкой для мыши - не более 10 шт.
69. Электрический лоток - не более 10 шт.
70. Держатель монитора с фронтальным креплением на колонне, 0-14 кг - не более 10 шт.
71. Держатель монитора с фронтальным креплением на колонне, 14-18 кг - не более 10 шт.
72. Держатель монитора с креплением на колонне универсальный, 0-14 кг - не более 10 шт.
73. Держатель монитора с креплением на колонне регулируемый, 0-14 кг - не более 10 шт.
74. Универсальный адаптер держателя монитора - не более 10 шт.
75. Держатель монитора с креплением в колонне универсальный, 0-14 кг - не более 10 шт.
76. Держатель монитора с креплением в колонне регулируемый, 0-14 кг - не более 10 шт.
77. Выключатель с креплением в колонне - не более 10 шт.
78. Электрический ящик с замком, 3 кг - не более 10 шт.
79. Универсальная полка, W400 - не более 10 шт.
80. Кабель-канал с заземлением, 0,3 м - не более 10 шт.
81. Кабель-канал с заземлением, 0,5 м - не более 10 шт.
82. Кабель-канал с заземлением, 1,0 м - не более 10 шт.
83. Кабель-канал с заземлением, 1,5 м - не более 10 шт.
84. Кабель-канал с заземлением, 5 м - не более 10 шт.

85. Адаптер GE, W140 - не более 10 шт.
86. Адаптер Mindray, W215 - не более 10 шт.
87. Адаптер Nihon Kohden, W214 - не более 10 шт.
88. Адаптер Nihon Kohden, W205 - не более 10 шт.
89. Адаптер Schiller, W122 - не более 10 шт.
90. Корзина пластиковая - не более 10 шт.
91. Клемма для монтажа аксессуаров на полках, 18 мм - не более 10 шт.
92. Клемма для монтажа аксессуаров на полках, 16 мм - не более 10 шт.
93. Клемма для монтажа аксессуаров на бегунках, 16 мм - не более 10 шт.
94. Клемма для монтажа аксессуаров на бегунках, 18 мм - не более 10 шт.
95. Держатель для сканера - не более 10 шт.
96. Держатель для аспирационной системы, 25,5 мм - не более 10 шт.
97. Держатель для аспирационной системы, 30 мм - не более 10 шт.
98. Держатель для аспирационной системы, 25 мм - не более 10 шт.
99. Адаптер, 16 мм - не более 10 шт.
100. Адаптер, 18 мм - не более 10 шт.
101. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 348 мм - не более 10 шт.
102. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 348 мм - не более 10 шт.
103. Держатель монитора двухплечевой, 0-14 кг, 348 мм, 348 мм - не более 10 шт.
104. Держатель монитора одноплечевой, 0-8 кг, 225 мм - не более 10 шт.
105. Держатель монитора двухплечевой, 0-8 кг, 225 мм, 250 мм - не более 10 шт.
106. Держатель монитора двухплечевой, 0-8 кг, 225 мм, 325 мм - не более 10 шт.

2. Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart Profi:

- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Profi, 21U
- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Profi, 25U
- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Profi, 30U
- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Profi, 35U

Состав:

1. Профиль – 1 шт.
2. Колесная база Profi – 1 шт.

Принадлежности:

1. Держатель емкости, 145 мм - не более 10 шт.
2. Держатель емкости, 120 мм - не более 10 шт.
3. Держатель газового баллона - не более 10 шт.
4. Корзина, маленькая - не более 10 шт.
5. Держатель блока питания, 5U - не более 10 шт.
6. Держатель блока питания, 7U - не более 10 шт.
7. Держатель бутылки, 60 мм - не более 10 шт.
8. Держатель газового баллона, 15 кг - не более 10 шт.
9. Держатель газового баллона, 20 кг - не более 10 шт.
10. Держатель газового баллона, 50 кг - не более 10 шт.
11. Фиксированный держатель - не более 10 шт.
12. Вращающийся держатель - не более 10 шт.
13. Держатель педали - не более 10 шт.
14. Держатель оборудования, 16 мм - не более 10 шт.
15. Держатель оборудования, 18 мм - не более 10 шт.
16. Держатель кабеля, двойной - не более 10 шт.
17. Уголки крепления оборудования - не более 10 шт.
18. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 250 мм - не более 10 шт.

19. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 250 мм - не более 10 шт.
20. Держатель монитора одноплечевой, 3-10 кг, 300 мм - не более 10 шт.
21. Держатель монитора одноплечевой, 8-14 кг, 300 мм - не более 10 шт.
22. Держатель монитора одноплечевой, 3-10 кг, 400 мм - не более 10 шт.
23. Держатель монитора одноплечевой, 8-14 кг, 400 мм - не более 10 шт.
24. Ручка - не более 10 шт.
25. Держатель компьютера, 5 кг - не более 10 шт.
26. Держатель компьютера, 20 кг - не более 10 шт.
27. Держатель ноутбука - не более 10 шт.
28. Держатель бутылки, 5 кг - не более 10 шт.
29. Штатив инфузионный, раздвижной - не более 10 шт.
30. Держатель (рельса), 162 мм - не более 10 шт.
31. Держатель (рельса), 390 мм - не более 10 шт.
32. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 325 мм - не более 10 шт.
33. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 325 мм - не более 10 шт.
34. Держатель монитора с фронтальным креплением на колонне универсальный, 0-14 кг - не более 10 шт.
35. Держатель монитора с полкой для клавиатуры - не более 10 шт.
36. Держатель монитора с регулировкой по высоте - не более 10 шт.
37. Набор колес 100 мм - не более 10 шт.
38. Набор колес 100 мм, электропроводные - не более 10 шт.
39. Набор колес 125 мм, электропроводные - не более 10 шт.
40. Бампер - не более 10 шт.
41. Кабель - разветвители, 3 выхода - не более 10 шт.
42. Набор кабелей Profi, POAG - не более 10 шт.
43. Блок розеток, 3 разъема - не более 10 шт.
44. Полка - не более 10 шт.
45. Полка с ручкой сбоку - не более 10 шт.
46. Полка с ручкой - не более 10 шт.
47. Полка с подставкой для мыши - не более 10 шт.
48. Полка с ручкой и подставкой для мыши - не более 10 шт.
49. Набор ящиков - не более 10 шт.
50. Набор ящиков с замком - не более 10 шт.
51. Набор ящиков, с подставкой для мыши - не более 10 шт.
52. Набор ящиков, ручка сбоку - не более 10 шт.
53. Набор ящиков с одним отделением - не более 10 шт.
54. Набор ящиков с одним отделением, ручка сбоку - не более 10 шт.
55. Набор ящиков с двумя отделениями - не более 10 шт.
56. Набор ящиков с двумя отделениями и ручкой сбоку - не более 10 шт.
57. Ящик для клавиатуры с подставкой для мыши - не более 10 шт.
58. Электрический лоток - не более 10 шт.
59. Держатель монитора с фронтальным креплением на колонне, 0-14 кг - не более 10 шт.
60. Держатель монитора с фронтальным креплением на колонне, 14-18 кг - не более 10 шт.
61. Держатель монитора с креплением на колонне универсальный, 0-14 кг - не более 10 шт.
62. Держатель монитора с креплением на колонне регулируемый, 0-14 кг - не более 10 шт.
63. Универсальный адаптер держателя монитора - не более 10 шт.
64. Держатель монитора с креплением в колонне универсальный, 0-14 кг - не более 10 шт.
65. Держатель монитора с креплением в колонне регулируемый, 0-14 кг - не более 10 шт.
66. Выключатель с креплением в колонне - не более 10 шт.
67. Электрический ящик с замком, 2 кг - не более 10 шт.
68. Электрический ящик с замком, 3 кг - не более 10 шт.
69. Универсальная полка, W400 - не более 10 шт.

70. Кабель-канал с заземлением, 0,3 м - не более 10 шт.
71. Кабель-канал с заземлением, 0,5 м - не более 10 шт.
72. Кабель-канал с заземлением, 1,0 м - не более 10 шт.
73. Кабель-канал с заземлением, 1,5 м - не более 10 шт.
74. Кабель-канал с заземлением, 5 м - не более 10 шт.
75. Адаптер GE, W140 - не более 10 шт.
76. Адаптер Mindray, W215 - не более 10 шт.
77. Адаптер Nihon Kohden, W214 - не более 10 шт.
78. Адаптер Nihon Kohden, W205 - не более 10 шт.
79. Адаптер Schiller, W122 - не более 10 шт.
80. Корзина пластиковая - не более 10 шт.
81. Клемма для монтажа аксессуаров на полках, 18 мм - не более 10 шт.
82. Клемма для монтажа аксессуаров на полках, 16 мм - не более 10 шт.
83. Клемма для монтажа аксессуаров на бегунках, 16 мм - не более 10 шт.
84. Клемма для монтажа аксессуаров на бегунках, 18 мм - не более 10 шт.
85. Держатель для сканера - не более 10 шт.
86. Держатель для аспирационной системы, 25,5 мм - не более 10 шт.
87. Держатель для аспирационной системы, 30 мм - не более 10 шт.
88. Держатель для аспирационной системы, 25 мм - не более 10 шт.
89. Адаптер, 16 мм - не более 10 шт.
90. Адаптер, 18 мм - не более 10 шт.
91. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 348 мм - не более 10 шт.
92. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 348 мм - не более 10 шт.
93. Держатель монитора двухплечевой, 0-14 кг, 348 мм, 348 мм - не более 10 шт.
94. Держатель монитора одноплечевой, 0-8 кг, 225 мм - не более 10 шт.
95. Держатель монитора двухплечевой, 0-8 кг, 225 мм, 250 мм - не более 10 шт.
96. Держатель монитора двухплечевой, 0-8 кг, 225 мм, 325 мм - не более 10 шт.

3. Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart Plus:

- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Plus, 21U
- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Plus, 25U
- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Plus, 30U
- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Plus, 35U

Состав:

1. Профиль – 1 шт.
2. Колесная база Plus – 1 шт.
3. Трансформатор, 660VA – 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Держатель емкости, 145 мм - не более 10 шт.
2. Держатель емкости, 120 мм - не более 10 шт.
3. Держатель газового баллона - не более 10 шт.
4. Корзина, маленькая - не более 10 шт.
5. Держатель блока питания, 5U - не более 10 шт.
6. Держатель блока питания, 7U - не более 10 шт.
7. Держатель бутылки, 60 мм - не более 10 шт.
8. Держатель газового баллона, 15 кг - не более 10 шт.
9. Держатель газового баллона, 20 кг - не более 10 шт.
10. Держатель газового баллона, 50 кг - не более 10 шт.
11. Фиксированный держатель - не более 10 шт.
12. Вращающийся держатель - не более 10 шт.

13. Держатель педали - не более 10 шт.
14. Держатель оборудования, 16 мм - не более 10 шт.
15. Держатель оборудования, 18 мм - не более 10 шт.
16. Держатель кабеля, двойной - не более 10 шт.
17. Уголки крепления оборудования - не более 10 шт.
18. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 250 мм - не более 10 шт.
19. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 250 мм - не более 10 шт.
20. Держатель монитора одноплечевой, 3-10 кг, 300 мм - не более 10 шт.
21. Держатель монитора одноплечевой, 8-14 кг, 300 мм - не более 10 шт.
22. Держатель монитора одноплечевой, 3-10 кг, 400 мм - не более 10 шт.
23. Держатель монитора одноплечевой, 8-14 кг, 400 мм - не более 10 шт.
24. Ручка - не более 10 шт.
25. Держатель компьютера, 5 кг - не более 10 шт.
26. Держатель компьютера, 20 кг - не более 10 шт.
27. Держатель ноутбука - не более 10 шт.
28. Держатель бутылки, 5 кг - не более 10 шт.
29. Штатив инфузионный, раздвижной - не более 10 шт.
30. Держатель (рельса), 162 мм - не более 10 шт.
31. Держатель (рельса), 390 мм - не более 10 шт.
32. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 325 мм - не более 10 шт.
33. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 325 мм - не более 10 шт.
34. Держатель монитора с фронтальным креплением на колонне, 0-14 кг - не более 10 шт.
35. Держатель монитора с фронтальным креплением на колонне универсальный, 0-14 кг - не более 10 шт.
36. Держатель монитора с полкой для клавиатуры - не более 10 шт.
37. Держатель монитора с регулировкой по высоте - не более 10 шт.
38. Набор колес 100 мм - не более 10 шт.
39. Набор колес 100 мм, электропроводные - не более 10 шт.
40. Набор колес 125 мм, электропроводные - не более 10 шт.
41. Бампер - не более 10 шт.
42. Кабель-канал, 21U - не более 10 шт.
43. Кабель-канал, 23U - не более 10 шт.
44. Кабель-канал, 25U - не более 10 шт.
45. Кабель-канал, 30U - не более 10 шт.
46. Кабель-канал, 35U - не более 10 шт.
47. Кабель-канал, T-slots 21U - не более 10 шт.
48. Кабель-канал, T-slots 23U - не более 10 шт.
49. Кабель-канал, T-slots 25U - не более 10 шт.
50. Кабель-канал, T-slots 30U - не более 10 шт.
51. Кабель-канал, T-slots 35U - не более 10 шт.
52. Электрический ящик с замком, 2 кг - не более 10 шт.
53. Кабель - разветвители, 3 выхода - не более 10 шт.
54. Блок розеток, 3 разъема - не более 10 шт.
55. Полка с ручкой сбоку - не более 10 шт.
56. Полка с ручкой - не более 10 шт.
57. Полка с подставкой для мыши - не более 10 шт.
58. Полка с ручкой и подставкой для мыши - не более 10 шт.
59. Набор ящиков - не более 10 шт.
60. Набор ящиков с замком - не более 10 шт.
61. Набор ящиков, с подставкой для мыши - не более 10 шт.
62. Набор ящиков, ручка сбоку - не более 10 шт.
63. Набор ящиков с одним отделением - не более 10 шт.

64. Набор ящиков с одним отделением, ручка сбоку - не более 10 шт.
65. Набор ящиков с двумя отделениями - не более 10 шт.
66. Набор ящиков с двумя отделениями и ручкой сбоку - не более 10 шт.
67. Ящик для клавиатуры с подставкой для мыши - не более 10 шт.
68. Электрический лоток - не более 10 шт.
69. Держатель монитора с фронтальным креплением на колонне, 14-18 кг - не более 10 шт.
70. Держатель монитора с креплением в колонне универсальный, 0-14 кг - не более 10 шт.
71. Держатель монитора с креплением в колонне регулируемый, 0-14 кг - не более 10 шт.
72. Держатель монитора с креплением на колонне регулируемый, 0-14 кг - не более 10 шт.
73. Универсальный адаптер держателя монитора - не более 10 шт.
74. Выключатель с креплением в колонне - не более 10 шт.
75. Электрический ящик с замком, 3 кг - не более 10 шт.
76. Универсальная полка, W400 - не более 10 шт.
77. Кабель-канал с заземлением, 0,3 м - не более 10 шт.
78. Кабель-канал с заземлением, 0,5 м - не более 10 шт.
79. Кабель-канал с заземлением, 1,0 м - не более 10 шт.
80. Кабель-канал с заземлением, 1,5 м - не более 10 шт.
81. Кабель-канал с заземлением, 5 м - не более 10 шт.
82. Адаптер GE, W140 - не более 10 шт.
83. Адаптер Mindray, W215 - не более 10 шт.
84. Адаптер Nihon Kohden, W214 - не более 10 шт.
85. Адаптер Nihon Kohden, W205 - не более 10 шт.
86. Адаптер Schiller, W122 - не более 10 шт.
87. Корзина пластиковая - не более 10 шт.
88. Клемма для монтажа аксессуаров на полках, 18 мм - не более 10 шт.
89. Клемма для монтажа аксессуаров на полках, 16 мм - не более 10 шт.
90. Клемма для монтажа аксессуаров на бегунках, 16 мм - не более 10 шт.
91. Клемма для монтажа аксессуаров на бегунках, 18 мм - не более 10 шт.
92. Держатель для сканера - не более 10 шт.
93. Держатель для аспирационной системы, 25,5 мм - не более 10 шт.
94. Держатель для аспирационной системы, 30 мм - не более 10 шт.
95. Держатель для аспирационной системы, 25 мм - не более 10 шт.
96. Адаптер, 16 мм - не более 10 шт.
97. Адаптер, 18 мм - не более 10 шт.
98. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 348 мм - не более 10 шт.
99. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 348 мм - не более 10 шт.
100. Держатель монитора двухплечевой, 0-14 кг, 348 мм, 348 мм - не более 10 шт.
101. Держатель монитора одноплечевой, 0-8 кг, 225 мм - не более 10 шт.
102. Держатель монитора двухплечевой, 0-8 кг, 225 мм, 250 мм - не более 10 шт.
103. Держатель монитора двухплечевой, 0-8 кг, 225 мм, 325 мм - не более 10 шт.

4. Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты:

- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты 35U, 3-10 кг
- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты 35U, 10-16 кг
- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты 40U, 3-10 кг
- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты 40U, 10-16 кг

- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты 45U, 3-10 кг
- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты 45U, 10-16 кг

Состав:

1. Профиль – 1 шт.
2. Колесная база с механической регулировкой высоты – 1 шт.

Принадлежности:

1. Держатель емкости, 145 мм - не более 10 шт.
2. Держатель емкости, 120 мм - не более 10 шт.
3. Держатель газового баллона - не более 10 шт.
4. Корзина, маленькая - не более 10 шт.
5. Держатель блока питания, 5U - не более 10 шт.
6. Держатель блока питания, 7U - не более 10 шт.
7. Держатель бутылки, 60 мм - не более 10 шт.
8. Держатель газового баллона, 15 кг - не более 10 шт.
9. Держатель газового баллона, 20 кг - не более 10 шт.
10. Держатель газового баллона, 50 кг - не более 10 шт.
11. Фиксированный держатель - не более 10 шт.
12. Вращающийся держатель - не более 10 шт.
13. Держатель педали - не более 10 шт.
14. Держатель оборудования, 16 мм - не более 10 шт.
15. Держатель оборудования, 18 мм - не более 10 шт.
16. Держатель кабеля, двойной - не более 10 шт.
17. Уголки крепления оборудования - не более 10 шт.
18. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 250 мм - не более 10 шт.
19. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 250 мм - не более 10 шт.
20. Держатель монитора одноплечевой, 3-10 кг, 300 мм - не более 10 шт.
21. Держатель монитора одноплечевой, 8-14 кг, 300 мм - не более 10 шт.
22. Держатель монитора одноплечевой, 3-10 кг, 400 мм - не более 10 шт.
23. Держатель монитора одноплечевой, 8-14 кг, 400 мм - не более 10 шт.
24. Ручка - не более 10 шт.
25. Держатель компьютера, 5 кг - не более 10 шт.
26. Держатель компьютера, 20 кг - не более 10 шт.
27. Держатель ноутбука - не более 10 шт.
28. Держатель бутылки, 5 кг - не более 10 шт.
29. Штатив инфузионный, раздвижной - не более 10 шт.
30. Держатель (рельса), 162 мм - не более 10 шт.
31. Держатель (рельса), 390 мм - не более 10 шт.
32. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 325 мм - не более 10 шт.
33. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 325 мм - не более 10 шт.
34. Держатель монитора с фронтальным креплением на колонне, 0-14 кг - не более 10 шт.
35. Держатель монитора с фронтальным креплением на колонне универсальный, 0-14 кг - не более 10 шт.
36. Держатель монитора с полкой для клавиатуры - не более 10 шт.
37. Держатель монитора с регулировкой по высоте - не более 10 шт.
38. Набор колес 100 мм - не более 10 шт.
39. Набор колес 100 мм, электропроводные - не более 10 шт.
40. Набор колес 125 мм, электропроводные - не более 10 шт.
41. Бампер - не более 10 шт.

42. Кабель-канал, 21U - не более 10 шт.
43. Кабель-канал, 23U - не более 10 шт.
44. Кабель-канал, 25U - не более 10 шт.
45. Кабель-канал, 30U - не более 10 шт.
46. Кабель-канал, 35U - не более 10 шт.
47. Кабель-канал, T-slots 21U - не более 10 шт.
48. Кабель-канал, T-slots 23U - не более 10 шт.
49. Кабель-канал, T-slots 25U - не более 10 шт.
50. Кабель-канал, T-slots 30U - не более 10 шт.
51. Кабель-канал, T-slots 35U - не более 10 шт.
52. Электрический ящик с замком, 2 кг - не более 10 шт.
53. Кабель - разветвитель, 3 выхода - не более 10 шт.
54. Набор кабелей Economy, POAG - не более 10 шт.
55. Набор кабелей Profi, POAG - не более 10 шт.
56. Блок розеток, 3 разъема - не более 10 шт.
57. Полка - не более 10 шт.
58. Полка с ручкой сбоку - не более 10 шт.
59. Полка с ручкой - не более 10 шт.
60. Полка с подставкой для мыши - не более 10 шт.
61. Полка с ручкой и подставкой для мыши - не более 10 шт.
62. Набор ящиков - не более 10 шт.
63. Набор ящиков с замком - не более 10 шт.
64. Набор ящиков, с подставкой для мыши - не более 10 шт.
65. Набор ящиков, ручка сбоку - не более 10 шт.
66. Набор ящиков с одним отделением - не более 10 шт.
67. Набор ящиков с одним отделением, ручка сбоку - не более 10 шт.
68. Набор ящиков с двумя отделениями - не более 10 шт.
69. Набор ящиков с двумя отделениями и ручкой сбоку - не более 10 шт.
70. Ящик для клавиатуры с подставкой для мыши - не более 10 шт.
71. Электрический лоток - не более 10 шт.
72. Держатель монитора с фронтальным креплением на колонне, 14-18 кг - не более 10 шт.
73. Держатель монитора с креплением на колонне универсальный, 0-14 кг - не более 10 шт.
74. Держатель монитора с креплением на колонне регулируемый, 0-14 кг - не более 10 шт.
75. Универсальный адаптер держателя монитора - не более 10 шт.
76. Держатель монитора с креплением в колонне универсальный, 0-14 кг - не более 10 шт.
77. Держатель монитора с креплением в колонне регулируемый, 0-14 кг - не более 10 шт.
78. Держатель монитора с креплением на колонне регулируемый, 0-14 кг - не более 10 шт.
79. Выключатель с креплением в колонне - не более 10 шт.
80. Электрический ящик с замком, 3 кг - не более 10 шт.
81. Универсальная полка, W400 - не более 10 шт.
82. Кабель-канал с заземлением, 0,3 м - не более 10 шт.
83. Кабель-канал с заземлением, 0,5 м - не более 10 шт.
84. Кабель-канал с заземлением, 1,0 м - не более 10 шт.
85. Кабель-канал с заземлением, 1,5 м - не более 10 шт.
86. Кабель-канал с заземлением, 5 м - не более 10 шт.
87. Адаптер GE, W140 - не более 10 шт.
88. Адаптер Mindray, W215 - не более 10 шт.
89. Адаптер Nihon Kohden, W214 - не более 10 шт.
90. Адаптер Nihon Kohden, W205 - не более 10 шт.
91. Адаптер Schiller, W122 - не более 10 шт.
92. Корзина пластиковая - не более 10 шт.
93. Клемма для монтажа аксессуаров на полках, 18 мм - не более 10 шт.

94. Клемма для монтажа аксессуаров на полках, 16 мм - не более 10 шт.
95. Клемма для монтажа аксессуаров на бегунках, 16 мм - не более 10 шт.
96. Клемма для монтажа аксессуаров на бегунках, 18 мм - не более 10 шт.
97. Держатель для сканера - не более 10 шт.
98. Держатель для аспирационной системы, 25,5 мм - не более 10 шт.
99. Держатель для аспирационной системы, 30 мм - не более 10 шт.
100. Держатель для аспирационной системы, 25 мм - не более 10 шт.
101. Адаптер, 16 мм - не более 10 шт.
102. Адаптер, 18 мм - не более 10 шт.
103. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 348 мм - не более 10 шт.
104. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 348 мм - не более 10 шт.
105. Держатель монитора двухплечевой, 0-14 кг, 348 мм, 348 мм - не более 10 шт.
106. Держатель монитора одноплечевой, 0-8 кг, 225 мм - не более 10 шт.
107. Держатель монитора двухплечевой, 0-8 кг, 225 мм, 250 мм - не более 10 шт.
108. Держатель монитора двухплечевой, 0-8 кг, 225 мм, 325 мм - не более 10 шт.

5. Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты, с педалью:

- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты, с педалью, 3-10 кг
- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты, с педалью, 8-14 кг
- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты, с педалью и электрическим ящиком, 3-10 кг
- Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты, с педалью и электрическим ящиком, 8-14 кг

Состав:

1. Профиль – 1 шт.
2. Колесная база с механической регулировкой высоты – 1 шт.

Принадлежности:

1. Держатель емкости, 145 мм - не более 10 шт.
2. Держатель емкости, 120 мм - не более 10 шт.
3. Держатель газового баллона - не более 10 шт.
4. Корзина, маленькая - не более 10 шт.
5. Держатель блока питания, 5U - не более 10 шт.
6. Держатель блока питания, 7U - не более 10 шт.
7. Держатель бутылки, 60 мм - не более 10 шт.
8. Держатель газового баллона, 15 кг - не более 10 шт.
9. Держатель газового баллона, 20 кг - не более 10 шт.
10. Держатель газового баллона, 50 кг - не более 10 шт.
11. Фиксированный держатель - не более 10 шт.
12. Вращающийся держатель - не более 10 шт.
13. Держатель педали - не более 10 шт.
14. Держатель оборудования, 16 мм - не более 10 шт.
15. Держатель оборудования, 18 мм - не более 10 шт.
16. Держатель кабеля, двойной - не более 10 шт.
17. Уголки крепления оборудования - не более 10 шт.
18. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 250 мм - не более 10 шт.
19. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 250 мм - не более 10 шт.
20. Держатель монитора одноплечевой, 3-10 кг, 300 мм - не более 10 шт.

21. Держатель монитора одноплечевой, 8-14 кг, 300 мм - не более 10 шт.
22. Держатель монитора одноплечевой, 3-10 кг, 400 мм - не более 10 шт.
23. Держатель монитора одноплечевой, 8-14 кг, 400 мм - не более 10 шт.
24. Ручка - не более 10 шт.
25. Держатель компьютера, 5 кг - не более 10 шт.
26. Держатель компьютера, 20 кг - не более 10 шт.
27. Держатель ноутбука - не более 10 шт.
28. Держатель бутылки, 5 кг - не более 10 шт.
29. Штатив инфузионный, раздвижной - не более 10 шт.
30. Держатель (рельса), 162 мм - не более 10 шт.
31. Держатель (рельса), 390 мм - не более 10 шт.
32. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 325 мм - не более 10 шт.
33. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 325 мм - не более 10 шт.
34. Держатель монитора с фронтальным креплением на колонне, 0-14 кг - не более 10 шт.
35. Держатель монитора с фронтальным креплением на колонне универсальный, 0-14 кг - не более 10 шт.
36. Держатель монитора с полкой для клавиатуры - не более 10 шт.
37. Держатель монитора с регулировкой по высоте - не более 10 шт.
38. Набор колес 100 мм - не более 10 шт.
39. Набор колес 100 мм, электропроводные - не более 10 шт.
40. Набор колес 125 мм, электропроводные - не более 10 шт.
41. Бампер - не более 10 шт.
42. Кабель-канал, 21U - не более 10 шт.
43. Кабель-канал, 23U - не более 10 шт.
44. Кабель-канал, 25U - не более 10 шт.
45. Кабель-канал, 30U - не более 10 шт.
46. Кабель-канал, 35U - не более 10 шт.
47. Кабель-канал, T-slots 21U - не более 10 шт.
48. Кабель-канал, T-slots 23U - не более 10 шт.
49. Кабель-канал, T-slots 25U - не более 10 шт.
50. Кабель-канал, T-slots 30U - не более 10 шт.
51. Кабель-канал, T-slots 35U - не более 10 шт.
52. Электрический ящик с замком, 2 кг - не более 10 шт.
53. Кабель - разветвителя, 3 выхода - не более 10 шт.
54. Набор кабелей Ecompu, POAG - не более 10 шт.
55. Набор кабелей Profi, POAG - не более 10 шт.
56. Блок розеток, 3 разъема - не более 10 шт.
57. Полка - не более 10 шт.
58. Полка с ручкой сбоку - не более 10 шт.
59. Полка с ручкой - не более 10 шт.
60. Полка с подставкой для мыши - не более 10 шт.
61. Полка с ручкой и подставкой для мыши - не более 10 шт.
62. Набор ящиков - не более 10 шт.
63. Набор ящиков с замком - не более 10 шт.
64. Набор ящиков, с подставкой для мыши - не более 10 шт.
65. Набор ящиков, ручка сбоку - не более 10 шт.
66. Набор ящиков с одним отделением - не более 10 шт.
67. Набор ящиков с одним отделением, ручка сбоку - не более 10 шт.
68. Набор ящиков с двумя отделениями - не более 10 шт.
69. Набор ящиков с двумя отделениями и ручкой сбоку - не более 10 шт.
70. Ящик для клавиатуры с подставкой для мыши - не более 10 шт.
71. Электрический лоток - не более 10 шт.

72. Держатель монитора с фронтальным креплением на колонне, 14-18 кг - не более 10 шт.
73. Держатель монитора с креплением на колонне универсальный, 0-14 кг - не более 10 шт.
74. Держатель монитора с креплением на колонне регулируемый, 0-14 кг - не более 10 шт.
75. Универсальный адаптер держателя монитора - не более 10 шт.
76. Держатель монитора с креплением в колонне универсальный, 0-14 кг - не более 10 шт.
77. Держатель монитора с креплением в колонне регулируемый, 0-14 кг - не более 10 шт.
78. Держатель монитора с креплением на колонне регулируемый, 0-14 кг - не более 10 шт.
79. Выключатель с креплением в колонне - не более 10 шт.
80. Электрический ящик с замком, 3 кг - не более 10 шт.
81. Универсальная полка, W400 - не более 10 шт.
82. Кабель-канал с заземлением, 0,3 м - не более 10 шт.
83. Кабель-канал с заземлением, 0,5 м - не более 10 шт.
84. Кабель-канал с заземлением, 1,0 м - не более 10 шт.
85. Кабель-канал с заземлением, 1,5 м - не более 10 шт.
86. Кабель-канал с заземлением, 5 м - не более 10 шт.
87. Адаптер GE, W140 - не более 10 шт.
88. Адаптер Mindray, W215 - не более 10 шт.
89. Адаптер Nihon Kohden, W214 - не более 10 шт.
90. Адаптер Nihon Kohden, W205 - не более 10 шт.
91. Адаптер Schiller, W122 - не более 10 шт.
92. Корзина пластиковая - не более 10 шт.
93. Клемма для монтажа аксессуаров на полках, 18 мм - не более 10 шт.
94. Клемма для монтажа аксессуаров на полках, 16 мм - не более 10 шт.
95. Клемма для монтажа аксессуаров на бегунках, 16 мм - не более 10 шт.
96. Клемма для монтажа аксессуаров на бегунках, 18 мм - не более 10 шт.
97. Держатель для сканера - не более 10 шт.
98. Держатель для аспирационной системы, 25,5 мм - не более 10 шт.
99. Держатель для аспирационной системы, 30 мм - не более 10 шт.
100. Держатель для аспирационной системы, 25 мм - не более 10 шт.
101. Адаптер, 16 мм - не более 10 шт.
102. Адаптер, 18 мм - не более 10 шт.
103. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 348 мм - не более 10 шт.
104. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 348 мм - не более 10 шт.
105. Держатель монитора двухплечевой, 0-14 кг, 348 мм, 348 мм - не более 10 шт.
106. Держатель монитора одноплечевой, 0-8 кг, 225 мм - не более 10 шт.
107. Держатель монитора двухплечевой, 0-8 кг, 225 мм, 250 мм - не более 10 шт.
108. Держатель монитора двухплечевой, 0-8 кг, 225 мм, 325 мм - не более 10 шт.

6. Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart:

- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 25-25U, W450
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 25-25U, W500
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 25-25U, W650
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 30-30U, W450
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 30-30U, W500
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 30-30U, W650
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 35-35U, W450
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 35-35U, W500
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 35-35U, W650
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 40-40U, W450
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 40-40U, W500
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 40-40U, W650

Состав:

1. Профиль – 1 шт.
2. Колесная база – 1 шт.
3. Трансформаторы 1200VA - 1 шт. (при необходимости)
4. Трансформаторы 1600VA - 1 шт. (при необходимости)
5. Трансформаторы 2000VA - 1 шт. (при необходимости)
6. Трансформаторы 1200VA, с индикатором утечки тока - 1 шт. (при необходимости)
7. Трансформаторы 1600VA, с индикатором утечки тока - 1 шт. (при необходимости)
8. Трансформаторы 2000VA, с индикатором утечки тока - 1 шт. (при необходимости)

Принадлежности:

1. Держатель емкости, 145 мм - не более 10 шт.
2. Держатель емкости, 120 мм - не более 10 шт.
3. Держатель на 2 эндоскопа, с вертикальной установкой - не более 10 шт.
4. Держатель на 1 эндоскоп, с вертикальной установкой - не более 10 шт.
5. Штатив инфузионный - не более 10 шт.
6. Держатель камеры - не более 10 шт.
7. Держатель камеры с зажимом - не более 10 шт.
8. Корзина, маленькая - не более 10 шт.
9. Держатель блока питания, 5U - не более 10 шт.
10. Держатель блока питания, 7U - не более 10 шт.
11. Держатель банки, вертикальное крепление - не более 10 шт.
12. Держатель банки, крепление на держатель эндоскопа - не более 10 шт.
13. Держатель коннектора - не более 10 шт.
14. Держатель шланга - не более 10 шт.
15. Держатель бутылки, 60 мм - не более 10 шт.
16. Держатель газового баллона, 15 кг - не более 10 шт.
17. Держатель газового баллона, 20 кг - не более 10 шт.
18. Держатель газового баллона, 50 кг - не более 10 шт.
19. Держатель (рельса) - не более 10 шт.
20. Фиксированный держатель - не более 10 шт.
21. Вращающийся держатель - не более 10 шт.
22. Крепление для аксессуаров - не более 10 шт.
23. Держатель педали - не более 10 шт.
24. Держатель оборудования, 16 мм - не более 10 шт.
25. Держатель оборудования, 18 мм - не более 10 шт.
26. Уголки крепления оборудования - не более 10 шт.
27. Пластина - не более 10 шт.
28. Пластина с 8 штекерами - не более 10 шт.
29. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 250 мм - не более 10 шт.
30. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 250 мм - не более 10 шт.
31. Держатель монитора двухплечевой, 0-14 кг, 250 мм, 250 мм - не более 10 шт.
32. Держатель монитора двухплечевой, 14-18 кг, 250 мм, 250 мм - не более 10 шт.
33. Держатель монитора одноплечевой, 3-10 кг, 300 мм - не более 10 шт.
34. Держатель монитора одноплечевой, 8-14 кг, 300 мм - не более 10 шт.
35. Держатель монитора одноплечевой, 3-10 кг, 400 мм - не более 10 шт.
36. Держатель монитора одноплечевой, 8-14 кг, 400 мм - не более 10 шт.
37. Держатель компьютера, 5 кг - не более 10 шт.
38. Держатель компьютера, 20 кг - не более 10 шт.
39. Держатель на 1 эндоскоп, с креплением на рельсы - не более 10 шт.
40. Держатель на 2 эндоскопа, с креплением на рельсы - не более 10 шт.
41. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 325 мм - не более 10 шт.

42. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 325 мм - не более 10 шт.
43. Держатель монитора двухплечевой, 0-14 кг, 325 мм, 325 мм - не более 10 шт.
44. Держатель монитора двухплечевой, 14-18 кг, 325 мм, 325 мм - не более 10 шт.
45. Набор колес, 100 мм, электропроводные - не более 10 шт.
46. Набор колес, 125 мм, электропроводные - не более 10 шт.
47. Бампер - не более 10 шт.
48. Набор колес 125 мм - не более 10 шт.
49. Полка W450 - не более 10 шт.
50. Полка W500 - не более 10 шт.
51. Полка W650 - не более 10 шт.
52. Полка W450 с ручкой - не более 10 шт.
53. Полка W500 с ручкой - не более 10 шт.
54. Полка W650 с ручкой - не более 10 шт.
55. Выдвижная полка W450 - не более 10 шт.
56. Выдвижная полка W500 - не более 10 шт.
57. Выдвижная полка W650 - не более 10 шт.
58. Ящик W450 - не более 10 шт.
59. Ящик W500 - не более 10 шт.
60. Ящик W650 - не более 10 шт.
61. Ящик с одним отделением, W450 - не более 10 шт.
62. Ящик с одним отделением, W500 - не более 10 шт.
63. Ящик с одним отделением, W650 - не более 10 шт.
64. Ящик для клавиатуры с подставкой для мыши, W450 - не более 10 шт.
65. Ящик для клавиатуры с подставкой для мыши, W500 - не более 10 шт.
66. Ящик для клавиатуры с подставкой для мыши, W650 - не более 10 шт.
67. Кабель-канал с заземлением, 0,3 м - не более 10 шт.
68. Кабель-канал с заземлением, 0,5 м - не более 10 шт.
69. Кабель-канал с заземлением, 1,0 м - не более 10 шт.
70. Кабель-канал с заземлением, 1,5 м - не более 10 шт.
71. Кабель-канал с заземлением, 5 м - не более 10 шт.
72. Клемма для монтажа аксессуаров на бегунках, 16 мм - не более 10 шт.
73. Клемма для монтажа аксессуаров на бегунках, 18 мм - не более 10 шт.
74. Адаптер, 16 мм - не более 10 шт.
75. Адаптер, 18 мм - не более 10 шт.
76. Защитный комплект для колес, 100 мм - не более 10 шт.
77. Защитный комплект для колес, 125 мм - не более 10 шт.
78. Полка с отсеком для хранения W450 - не более 10 шт.
79. Полка с отсеком для хранения W500 - не более 10 шт.
80. Полка с отсеком для хранения W650 - не более 10 шт.
81. Полка с отсеком для хранения и держателем монитора W450 - не более 10 шт.
82. Полка с отсеком для хранения и держателем монитора W500 - не более 10 шт.
83. Полка с отсеком для хранения и держателем монитора W650 - не более 10 шт.
84. Кабель Schuko - не более 10 шт.
85. Кабель Schuko с POAG - не более 10 шт.
86. Сетевой кабель питания, 0,6 м - не более 10 шт.
87. Сетевой кабель питания, 1,0 м - не более 10 шт.
88. Сетевой кабель питания, 1,5 м - не более 10 шт.
89. Сетевой кабель питания, 2,0 м - не более 10 шт.
90. Сетевой кабель питания, 2,5 м - не более 10 шт.
91. Адаптеры для кабелей, 0,3 м - не более 10 шт.
92. Ящик с замком W450 - не более 10 шт.
93. Ящик с замком W500 - не более 10 шт.

94. Ящик с замком W650 - не более 10 шт.
95. Ручка, W450 - не более 10 шт.
96. Ручка, W500 - не более 10 шт.
97. Ручка, W650 - не более 10 шт.
98. Универсальный держатель – не более 10 шт.
99. Держатель монитора с креплением на колонне, 0-14 кг – не более 10 шт.
100. Держатель монитора с креплением на колонне одноплечевой, 300 мм, 3-10 кг – не более 10 шт.
101. Держатель монитора с креплением на колонне одноплечевой, 400 мм, 3-10 кг – не более 10 шт.
102. Держатель монитора с креплением на колонне одноплечевой, 300 мм, 8-14 кг – не более 10 шт.
103. Держатель монитора с креплением на колонне одноплечевой, 400 мм, 8-14 кг – не более 10 шт.
104. Держатель монитора с креплением на колонне двухплечевой, 300 мм, 350 мм, 3-10 кг – не более 10 шт.
105. Держатель монитора с креплением на колонне двухплечевой, 300 мм, 350 мм, 8-14 кг – не более 10 шт.
106. Держатель монитора с креплением на колонне двухплечевой, 400 мм, 350 мм, 3-10 кг – не более 10 шт.
107. Держатель монитора с креплением на колонне двухплечевой, 400 мм, 350 мм, 8-14 кг – не более 10 шт.
108. Держатель двух мониторов с креплением на колонне, 0-14 кг – не более 10 шт.
109. Держатель отсоса, 25,5 мм – не более 10 шт.
110. Держатель отсоса, 25 мм – не более 10 шт.
111. Держатель отсоса, 30 мм – не более 10 шт.
112. Пружинная гайка М6 – не более 10 шт.
113. Блок розеток, 8 разъемов – не более 10 шт.
114. Блок розеток, 8 разъемов, с переключателем – не более 10 шт.
115. Блок розеток, 6 разъемов – не более 10 шт.
116. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 348 мм – не более 10 шт.
117. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 348 мм – не более 10 шт.
118. Держатель монитора двухплечевой, 0-14 кг, 348 мм, 348 мм – не более 10 шт.
119. Держатель монитора двухплечевой, 14-18 кг, 348 мм, 348 мм – не более 10 шт.
120. Держатель монитора одноплечевой, 0-8 кг, 225 мм – не более 10 шт.
121. Держатель монитора двухплечевой, 0-8 кг, 225 мм, 250 мм – не более 10 шт.
122. Держатель монитора двухплечевой, 0-8 кг, 225 мм, 325 мм – не более 10 шт.

7. Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus:

- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 25-30U, W450
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 25-30U, W500
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 25-30U, W650
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 30-35U, W450
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 30-35U, W500
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 30-35U, W650
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 35-40U, W450
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 35-40U, W500
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 35-40U, W650
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 40-45U, W450
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 40-45U, W500
- Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 40-45U, W650

Состав:

1. Профиль – 1 шт.
2. Колесная база – 1 шт
3. Трансформаторы 1200VA - 1 шт. (при необходимости)
4. Трансформаторы 1600VA - 1 шт. (при необходимости)
5. Трансформаторы 2000VA - 1 шт. (при необходимости)
6. Трансформаторы 1200VA, с индикатором утечки тока - 1 шт. (при необходимости)
7. Трансформаторы 1600VA, с индикатором утечки тока - 1 шт. (при необходимости)
8. Трансформаторы 2000VA, с индикатором утечки тока - 1 шт. (при необходимости)

Принадлежности:

1. Держатель емкости, 145 мм - не более 10 шт.
2. Держатель емкости, 120 мм - не более 10 шт.
3. Держатель на 2 эндоскопа, с вертикальной установкой - не более 10 шт.
4. Держатель на 1 эндоскоп, с вертикальной установкой - не более 10 шт.
5. Штатив инфузионный - не более 10 шт.
6. Держатель камеры - не более 10 шт.
7. Держатель камеры с зажимом - не более 10 шт.
8. Корзина, маленькая - не более 10 шт.
9. Держатель блока питания, 5U - не более 10 шт.
10. Держатель блока питания, 7U - не более 10 шт.
11. Держатель банки, вертикальное крепление - не более 10 шт.
12. Держатель банки, крепление на держатель эндоскопа - не более 10 шт.
13. Держатель коннектора - не более 10 шт.
14. Держатель шланга - не более 10 шт.
15. Держатель бутылки, 60мм - не более 10 шт.
16. Держатель газового баллона, 15 кг - не более 10 шт.
17. Держатель газового баллона, 20 кг - не более 10 шт.
18. Держатель газового баллона, 50 кг - не более 10 шт.
19. Держатель (рельса) - не более 10 шт.
20. Фиксированный держатель - не более 10 шт.
21. Вращающийся держатель - не более 10 шт.
22. Крепление для аксессуаров - не более 10 шт.
23. Держатель педали - не более 10 шт.
24. Держатель оборудования, 16 мм - не более 10 шт.
25. Держатель оборудования, 18 мм - не более 10 шт.
26. Уголки крепления оборудования - не более 10 шт.
27. Пластина - не более 10 шт.
28. Пластина с 8 штекерами - не более 10 шт.
29. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 250 мм - не более 10 шт.
30. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 250 мм - не более 10 шт.
31. Держатель монитора двухплечевой, 0-14 кг, 250 мм, 250 мм - не более 10 шт.
32. Держатель монитора двухплечевой, 14-18 кг, 250 мм, 250 мм - не более 10 шт.
33. Держатель монитора одноплечевой, 3-10 кг, 300 мм - не более 10 шт.
34. Держатель монитора одноплечевой, 8-14 кг, 300 мм - не более 10 шт.
35. Держатель монитора одноплечевой, 3-10 кг, 400 мм - не более 10 шт.
36. Держатель монитора одноплечевой, 8-14 кг, 400 мм - не более 10 шт.
37. Держатель компьютера, 5 кг - не более 10 шт.
38. Держатель компьютера, 20 кг - не более 10 шт.
39. Держатель на 1 эндоскоп, с креплением на рельсы - не более 10 шт.
40. Держатель на 2 эндоскопа, с креплением на рельсы - не более 10 шт.
41. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 325 мм - не более 10 шт.

42. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 325 мм - не более 10 шт.
43. Держатель монитора двухплечевой, 0-14 кг, 325 мм, 325 мм - не более 10 шт.
44. Держатель монитора двухплечевой, 14-18кг, 325 мм, 325 мм - не более 10 шт.
45. Набор колес, 100 мм, электропроводные - не более 10 шт.
46. Набор колес, 125 мм, электропроводные - не более 10 шт.
47. Бампер - не более 10 шт.
48. Набор колес 125 мм - не более 10 шт.
49. Полка W450 - не более 10 шт.
50. Полка W500 - не более 10 шт.
51. Полка W650 - не более 10 шт.
52. Полка W450 с ручкой - не более 10 шт.
53. Полка W500 с ручкой - не более 10 шт.
54. Полка W650 с ручкой - не более 10 шт.
55. Выдвижная полка W450 - не более 10 шт.
56. Выдвижная полка W500 - не более 10 шт.
57. Выдвижная полка W650 - не более 10 шт.
58. Ящик W450 - не более 10 шт.
59. Ящик W500 - не более 10 шт.
60. Ящик W650 - не более 10 шт.
61. Ящик с одним отделением, W450 - не более 10 шт.
62. Ящик с одним отделением, W500 - не более 10 шт.
63. Ящик с одним отделением, W650 - не более 10 шт.
64. Ящик для клавиатуры с подставкой для мыши, W450 - не более 10 шт.
65. Ящик для клавиатуры с подставкой для мыши, W500 - не более 10 шт.
66. Ящик для клавиатуры с подставкой для мыши, W650 - не более 10 шт.
67. Кабель-канал с заземлением, 0,3 м - не более 10 шт.
68. Кабель-канал с заземлением, 0,5 м - не более 10 шт.
69. Кабель-канал с заземлением, 1,0 м - не более 10 шт.
70. Кабель-канал с заземлением, 1,5 м - не более 10 шт.
71. Кабель-канал с заземлением, 5 м - не более 10 шт.
72. Клемма для монтажа аксессуаров на бегунках, 16 мм - не более 10 шт.
73. Клемма для монтажа аксессуаров на бегунках, 18 мм - не более 10 шт.
74. Адаптер, 16 мм - не более 10 шт.
75. Адаптер, 18 мм - не более 10 шт.
76. Защитный комплект для колес, 100 мм - не более 10 шт.
77. Защитный комплект для колес, 125 мм - не более 10 шт.
78. Полка с отсеком для хранения W450 - не более 10 шт.
79. Полка с отсеком для хранения W500 - не более 10 шт.
80. Полка с отсеком для хранения W650 - не более 10 шт.
81. Полка с отсеком для хранения и держателем монитора W450 - не более 10 шт.
82. Полка с отсеком для хранения и держателем монитора W500 - не более 10 шт.
83. Полка с отсеком для хранения и держателем монитора W650 - не более 10 шт.
84. Кабель Schuko - не более 10 шт.
85. Кабель Schuko с POAG - не более 10 шт.
86. Сетевой кабель питания, 0,6 м - не более 10 шт.
87. Сетевой кабель питания, 1,0 м - не более 10 шт.
88. Сетевой кабель питания, 1,5 м - не более 10 шт.
89. Сетевой кабель питания, 2,0 м - не более 10 шт.
90. Сетевой кабель питания, 2,5 м - не более 10 шт.
91. Адаптеры для кабелей, 0,3 м - не более 10 шт.
92. Ящик с замком W450 - не более 10 шт.
93. Ящик с замком W500 - не более 10 шт.

94. Ящик с замком W650 - не более 10 шт.
95. Ручка, W450 - не более 10 шт.
96. Ручка, W500 - не более 10 шт.
97. Ручка, W650 - не более 10 шт.
98. Универсальный держатель – не более 10 шт.
99. Держатель монитора с креплением на колонне, 0-14 кг – не более 10 шт.
100. Держатель монитора с креплением на колонне одноплечевой, 300 мм, 3-10 кг – не более 10 шт.
101. Держатель монитора с креплением на колонне одноплечевой, 400 мм, 3-10 кг – не более 10 шт.
102. Держатель монитора с креплением на колонне одноплечевой, 300 мм, 8-14 кг – не более 10 шт.
103. Держатель монитора с креплением на колонне одноплечевой, 400 мм, 8-14 кг – не более 10 шт.
104. Держатель монитора с креплением на колонне двухплечевой, 300 мм, 350 мм, 3-10 кг – не более 10 шт.
105. Держатель монитора с креплением на колонне двухплечевой, 300 мм, 350 мм, 8-14 кг – не более 10 шт.
106. Держатель монитора с креплением на колонне двухплечевой, 400 мм, 350 мм, 3-10 кг – не более 10 шт.
107. Держатель монитора с креплением на колонне двухплечевой, 400 мм, 350 мм, 8-14 кг – не более 10 шт.
108. Держатель двух мониторов с креплением на колонне, 0-14 кг – не более 10 шт.
109. Держатель отсоса, 25,5 мм – не более 10 шт.
110. Держатель отсоса, 25 мм – не более 10 шт.
111. Держатель отсоса, 30 мм – не более 10 шт.
112. Пружинная гайка М6 – не более 10 шт.
113. Блок розеток, 8 разъемов - не более 10 шт.
114. Блок розеток, 8 разъемов, с переключателем - не более 10 шт.
115. Блок розеток, 6 разъемов - не более 10 шт.
116. Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 348 мм - не более 10 шт.
117. Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 348 мм - не более 10 шт.
118. Держатель монитора двухплечевой, 0-14 кг, 348 мм, 348 мм - не более 10 шт.
119. Держатель монитора одноплечевой, 0-8 кг, 225 мм - не более 10 шт.
120. Держатель монитора двухплечевой, 0-8 кг, 225 мм, 250 мм - не более 10 шт.
121. Держатель монитора двухплечевой, 0-8 кг, 225 мм, 325 мм - не более 10 шт.

По тексту документа могут встречаться следующие варианты наименования медицинского изделия – стойка медицинская, стойка, медицинское изделие, изделие.

2. Производитель

ITD GmbH (Ай Ти Ди, ГмбХ)
Sportplatzstr. 3, 84381 Johanniskirchen, Germany (Германия)
+ 49 89 61 44 25-24
l.wiehemeyer@itd-cart.com

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская Инвестиционная Компания»

ООО «МедИнКом»

Россия, 443087, Самарская область, г. Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 356, кв. 176.

+7 (846) 203-17-84

info@medincom.org

3. Назначение медицинского изделия

- Размещение медицинских приборов в соответствии с допустимой нагрузкой в пределах заданной устойчивости (чтобы не допустить опрокидывание)
- Подключение к локальному источнику питания и передача электроэнергии на приборы, установленные на стойке.
- Закрепление оригинальных компонентов и аксессуаров ITD.

Показания

Необходимость позиционирования медицинских приборов в больницах и лечебно-профилактических учреждениях.

Противопоказания:

Противопоказания отсутствуют

Возможные побочные эффекты:

Побочных эффектов не обнаружено.

4. Классификация медицинского изделия

Медицинское изделие является продуктом I класса риска в соответствии с директивой ЕС MDD 93/42/EEG, приложение IX.

Производитель заявляет о соответствии данного продукта основополагающим требованиям MDD 93/42/EEG, приложение II, и подтверждает это маркировкой CE.

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: 136860.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: 1.

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности: 32.50.50.190 «Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки».

Вид и продолжительность контакта с организмом человека: контакт с телом человека не предусмотрен.

Классификация стоек в соответствии с IEC 60601-1

Примечание: требования стандарта IEC 60601-1 распространяются на стойки, непосредственно использующие электрическую энергию для функционирования, а также на другие варианты стоек в случае подключения сторонних электрических изделий к питающей сети через сетевые разветвители, вмонтированные в стойки (при заказе сетевых разветвителей в качестве принадлежностей), а также при подключении сторонних электрических изделий к питающей сети через изолирующие трансформаторы, входящие в состав некоторых вариантов стоек. При таком подключении стойка и сторонние электрические изделия образуют медицинскую электрическую систему.

Защита от поражения электрическим током	Изделие I класса, без рабочей части
Стерильность	Изделие поставляется в нестерильном виде, стерилизация пользователем не предусмотрена.
Защита от опасного проникания воды или твердых частиц по IEC 60529	IP20
Пригодность для эксплуатации в среде с повышенным содержанием кислорода	Изделие не подходит для использования в среде с повышенным содержанием кислорода.
Режим работы	Продолжительный режим работы

5. Общее описание медицинского изделия

Примечание:

- Допуски на указанные технические характеристики составляют $\pm 10\%$, если не указано иное.

Варианты исполнения	Усилие, необходимое для перемещения	Время установления рабочего режима	Предельно допустимый уровень шума
1. Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart Economy: – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Economy, 21U – Стойка медицинская для	Не более 200 Н	До 18 мин	68 дБА (измерение на расстоянии)

аппаратуры Vexio-cart, Economy, 25U – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Economy, 30U – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Economy, 35U 2. Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart Profi: – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Profi, 21U – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Profi, 25U – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Profi, 30U – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Profi, 35U 3. Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart Plus: – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Plus, 21U – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Plus, 25U – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Plus, 30U – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Plus, 35U 4. Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты: – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты 35U, 3-10 кг – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты 35U, 10-16 кг – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты 40U, 3-10 кг – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты 40U, 10-16 кг – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты 45U, 3-10 кг – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты 45U, 10-16 кг 5. Стойка медицинская для			3 м)
--	--	--	------

аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты, с педалью: – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты, с педалью, 3-10 кг – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты, с педалью, 8-14 кг – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты, с педалью и электрическим ящиком, 3-10 кг – Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты, с педалью и электрическим ящиком, 8-14 кг 6. Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart: – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 25-25U, W450 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 25-25U, W500 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 25-25U, W650 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 30-30U, W450 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 30-30U, W500 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 30-30U, W650 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 35-35U, W450 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 35-35U, W500 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 35-35U, W650 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 40-40U, W450 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 40-40U, W500			
---	--	--	--

– Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 40-40U, W650			
7. Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus: – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 25-30U, W450 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 25-30U, W500 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 25-30U, W650 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 30-35U, W450 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 30-35U, W500 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 30-35U, W650 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 35-40U, W450 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 35-40U, W500 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 35-40U, W650 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 40-45U, W450 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 40-45U, W500 – Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart Plus, 40-45U, W650			

Стойки медицинские для аппаратуры серии Vexio-cart

Vexio-cart - современная одноколонная стойка с максимальной нагрузкой до 65 кг.

Эта компактная стойка отличается модульной конфигурацией: базовая комплектация стойки может быть дополнена многочисленными системными и вспомогательными компонентами. Стойка Vexio-cart доступна в комплекте с дополнительным изолирующим трансформатором 660 ВА и колесной базой. В зависимости от требований к электрификации вашего медицинского оборудования Vexio-cart представлена следующими вариантами опорных стоек: Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart Economy; Стойка медицинская

для аппаратуры Vexio-cart Profi; Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart Plus; Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты; Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты, с педалью.

Vexio-cart Economy - базовая версия, которая может быть расширена по мере необходимости различными отдельными компонентами (принадлежностями). Vexio-cart Profi может быть расширена такими компонентами (принадлежностями) системы, как электрический ящик и кабельные каналы, что позволяет создать упорядоченную систему хранения кабелей вашего оборудования. Опорная стойка Vexio-cart Plus поставляется с направляющими большего размера, что позволяет расположить электрические кабели внутри опорной колонны.

Эффективный дизайн продукта

- В Vexio-cart установлены основания из литого алюминия, обеспечивающие потребителю широкое пространство полки. Vexio-cart обладает высокой грузоподъемностью и минимальной монтажной высотой всего 32 мм.
- Телескопические рельсы с самоблокирующимся механизмом не допускают случайного выкатывания вперед не закрытого на замок выдвижного ящика.
- Технология рельсов позволяет полностью выдвинуть выдвижной ящик, что положительно влияет на полезное пространство для хранения внутри ящика и упрощает уборку.
- Форма, выбор материала и других компонентов Vexio-cart позволяют создать идеальное сочетание надёжности, стабильности и лёгкости конструкции.
- Цвет кабельных каналов и ручек привлекает внимание и выполняет важную роль.

Высокая степень гибкости

- Для крепления компонентов и принадлежностей можно использовать пространство спереди и сзади компактных вертикальных направляющих.
- Компоненты или кабельные каналы могут быть установлены гибко, встроены в опорную стойку или располагаться по бокам опорной стойки.

Гигиена

- Отверстия Т-образных пазов на вертикальных профилях закрываются с помощью гигиенических накладок и крышек. Таким образом, практически вся поверхность стойки закрыта, что облегчает уборку.

Эргономика

- Разная высота стойки и дополнительная регулировка высоты вместе способствуют естественной осанке при работе.
- Задняя нажимная рукоятка и фиксатор на полках обеспечивают простоту перемещения, а также точное позиционирование стойки во время транспортировки и при работе.

Электрификация и функциональное размещение кабелей

- В боковых кабельных каналах можно проложить до 3 кабелей, которые можно использовать на любой желаемой высоте. Розетки и кабели также можно разместить непосредственно на опорной стойке, что ещё больше упрощает подключение устройства.

- Дополнительный электрический ящик может быть установлен в основании. В нем можно разместить разветвитель с 3 розетками.

- Дополнительный изолирующий трансформатор 660 ВА предлагает усиленную изоляцию сети и обеспечивает защиту пациентов от ударов током и скачков напряжения.

Примечание: Электрический ящик не может быть установлен одновременно с изолирующим трансформатором.

Стойки медицинские для аппаратуры серии Symbio-cart

Symbio-cart - компактная стойка представляет собой портальное оборудование с общей нагрузкой до 180 кг.

Существует три монтажных ширины: 450 мм, 500 мм и максимальная 650 мм. Монтажная высота может варьироваться от 25U до 45U (1U = Unit = 32 мм), а также есть более высокая колонна (вариант исполнения Plus) для большей гибкости.

Базовая стойка Symbio-cart состоит из стабильного основания, двух боковых вертикальных профилей и центральной медиа-колонны. Основание устойчиво благодаря своей прочной стальной конструкции и в то же время может использоваться в качестве полки для оборудования. Все кабели стойки проходят через блокируемую колонку носителей. Помимо кабелей передачи данных и питания, а также удлинителей кабелей, здесь также достаточно места для штекерных прокладок для конкретных стран. Резиновые уплотнения вдоль колонны носителей позволяют вставлять или выводить кабель на нужную высоту. Компоненты системы и аксессуары могут быть монтируются как внутри, так и снаружи профилей и колонки носителей. Четыре запирающихся сдвоенных колеса (Ø 100 мм) обеспечивают высокий уровень легкости перемещения при перемещении и надежную фиксацию на месте использования.

При необходимости в комплект поставки могут входить изолирующие трансформаторы 1200 ВА / 1600 ВА / 2000 ВА с и без индикатора утечки тока.

6. Потенциальные потребители

Медицинское изделие должно использоваться только квалифицированным медицинским персоналом, который ознакомлен с руководством по эксплуатации.

7. Меры предосторожности

Общие инструкции по технике безопасности

- Персонал, прямо или косвенно работающий со стойками для аппаратуры, должен пройти соответствующий инструктаж!

- Работы по настройке должен выполнять специально обученный персонал.
- Работы по ремонту и техническому обслуживанию должны выполняться исключительно специалистами фирмы ITD GmbH или её официальными представителями.

Обслуживание / эксплуатация

• **Внимание!** При работе с медицинским изделием потребитель и персонал сервисной службы должны работать в защитных перчатках для исключения контакта изделия с телом человека.

• При любом перемещении стойки медицинской для аппаратуры необходимо следить за тем, чтобы не нанести телесных повреждений людям или не причинить повреждений окружающим предметам, оборудованию и т.п.!

• Присоединения сторонних медицинских электроприборов к питающей сети через стойку должны выполняться только квалифицированным персоналом. При изменении общей системы снова выполнить проверку на соответствие IEC 60601-1.

• Следите за тем, чтобы на электроприборы на стойке не попадала вода. Ни в коем случае не ставьте на электроприборы или блок штепсельных розеток продукцию, которая может выделять влагу.

• Эксплуатация электроприборов не должна осуществляться в среде, где присутствуют легковоспламеняющиеся газы, такие как, например, средства для наркоза и т.п. В этом отношении вся ответственность возлагается на потребителя.

• Стойки медицинские для аппаратуры предназначены для создания удобной и мобильной рабочей станции для электромедицинских установок. Чтобы вся медицинская электрическая система соответствовала требованиям IEC 60601-1, необходимо, чтобы сумма всех утечек на землю не превышала максимальное предельное значение 0,5 мА. Если сумма утечек на землю превышает вышеназванное значение, питание необходимо подавать через изолирующий трансформатор.

• Если устанавливается изолирующий трансформатор, то суммарное потребление мощности всех подключаемых приборов не должно выходить за пределы номинального значения трансформатора.

• К штепсельным розеткам / соединительным линиям можно подключать только те приборы, которые соответствуют требованиям IEC 60601-1.

• Дополнительные медицинские приборы со штифтами для выравнивания потенциалов должны подключаться с помощью жёлто-зелёного провода, снабжённого штифтами для выравнивания потенциалов!

• **Внимание:** не допускается превышение указанной на типовой табличке общей производительности. К имеющемуся блоку штепсельных розеток **НЕЛЬЗЯ** подсоединять другой блок штепсельных розеток.

Нагрузка

- Общий вес приборов и аксессуаров на стойке медицинской не должен превышать допустимый общий вес нагрузки (см. ярлык с данными по нагрузке на корпусе стойки).
- Нельзя превышать величину удельной нагрузки, указанную на принадлежностях!
- Нельзя превышать величины нагрузки, указанные на навесных деталях.

Защита от инфекций

- При очистке и дезинфекции необходимо соблюдать правила гигиены.
- Приборы и оборудование, отправляемые на ремонтно-техническое обслуживание, должны предварительно пройти очистку и дезинфекцию!
- Утилизацию остатков чистящих и дезинфекционных средств необходимо производить без нанесения ущерба окружающей среде!

Эксплуатация

При соблюдении мер предосторожности изделия не требуют особых указаний по эксплуатации и используются в зависимости от указаний по эксплуатации оборудования и изделий, располагающихся на стойках. Стойки поставляются в собранном виде. После распаковки и проверки комплектности их необходимо подключить к сети питания и они готовы к использованию.

8. Требования к охране окружающей среды при применении медицинского изделия

Данное медицинское изделие при использовании, транспортировке и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

9. Очистка, дезинфекция, стерилизация

Медицинские изделия поставляются нестерильными. Стерилизация пользователем не требуется. Периодическую процедуру очистки в сочетании с процедурой дезинфекции рекомендуется проводить один раз в 15 дней, либо при визуальном накоплении пыли и других свидетельствах загрязнения.

Внимание: Перед выполнением очистки и дезинфекции отключите общую систему от сети.

Очистка

1. Удалите сильные загрязнения с поверхности изделия, протерев одноразовой салфеткой, смоченной стерилизованной водой. Осторожно выбросьте использованные салфетки.
2. Дайте впитаться в течение 2 минут при комнатной температуре, чтобы размягчить высохшие загрязнения.
3. Удалите воду чистой безворсовой тканью (марлей).

Дезинфекция

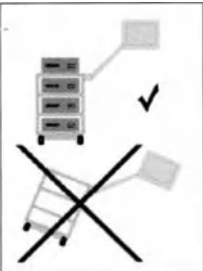
1. Перед дезинфекцией изделие необходимо очистить, выполнив описанную выше процедуру очистки.
2. Распылите на поверхность изделия изопропиловый спирт с концентрацией 70% об/об.
3. Дайте настояться 15 минут при комнатной температуре.
4. Удалите дезинфицирующее средство чистой безворсовой тканью (марлей).
5. Повторите шаги 2, 3 и 4 еще раз.
6. Протрите поверхность стерилизованной водой и чистой тканью без ворса, чтобы удалить остатки дезинфицирующего средства.
7. Дайте изделию высохнуть, пока не испарятся все остатки чистящей жидкости.

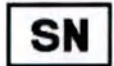
Помимо изопропилового спирта в качестве дезинфицирующего средства также можно использовать следующие средства: Cidex (Сайдекс), Aldasan 200 (Алдазан 200), Kohrsolin (Корзолин), Mellsitt (Меллситт), Gigasept FF (Гигасепт ФФ), Lysoformin spezial (Лизоформин Специаль), Spray Aktiv (Спрей Актив), Terralin (Терралин), Quartamon Med (Квартамон Мед), Mikrocid Liquid (Микроцид Ликвид).

10. Маркировка

Символы, используемые для маркировки изделия:

Символ	Значение
	Производитель
	Дата изготовления
	Положение (состояние) "ВКЛ." электропитания (горит зеленым)
	Положение (состояние) "ВЫКЛ." электропитания
	«Вкл.» (горит зеленым) / «Выкл» (управление давлением)
	Осторожно!
	Эквипотенциальное заземление
	Защитное заземление (земля)
	См. руководство по эксплуатации

	Это не разъём Ethernet! Сюда можно подключать только панель управления прибора контроля сопротивления изоляции ELG (поставляется опционно). Некорректное использование может привести к повреждению прибора, а также к сбоям в сети!
	Переработка электронных и электрических приборов
	Соответствие стандартам ЕС
	Переменный ток
	Общая мощность: сумма мощностей, передаваемых на одну вспомогательную розетку, не должна превышать общую мощность.
	Общая нагрузка на корпус: максимальная общая нагрузка (= суммарный вес всех компонентов). Для соблюдения допустимой нагрузки смотрите соответствующую этикетку.
	Весовая нагрузка (компонентов): Для соблюдения допустимой нагрузки смотрите соответствующую этикетку.
	Подходит только для внутренних помещений
	Тяжелые предметы: во избежание травм необходимо гарантировать, чтобы при перемещении по крайней мере два человека поддерживали изделие
	Способ распространения
	Регулировка мощности зажима (поворотный узел)
	Регулировка нагрузки: Отображает диапазон нагрузок с направлением вращения для регулировки нагрузки (3-10 кг или 8-14 кг).
	Опасность опрокидывания: При работе с приборными тележками необходимо соблюдать последовательность загрузки и разгрузки.

	Тормозное устройство: Показывает положение консоли во время выгрузки приборов и направление блокировки или деблокировки тормозного устройства
	Рабочее положение: Показывает возможные рабочие положения (справа / слева) и предупреждает о возможной опасности опрокидывания при изменении положения.
	Функция блокировки: Показывает направление блокировки или деблокировки компонентов.
	Не толкать
	Код партии
	Серийный номер
	Номер по каталогу
	Беречь от влаги
	Вверх
	Хрупкое, обращаться осторожно!
	Не допускать воздействия солнечного света
	Предел температуры
	Диапазон влажности
	Ограничение атмосферного давления

Примеры макетов маркировки изделия







Пример маркировки транспортной упаковки принадлежностей на примере принадлежности
«Держатель на 2 эндоскопа, с креплением на полку»



Образец оригинальной маркировки принадлежностей на примере принадлежности
«Блок розеток, 6 разъемов»

Примеры макетов русскоязычных стикеров Стоек и принадлежностей

Стойка медицинская для аппаратуры Vexio-cart, Plus, 35U



ITD GmbH (Ай Ти Ди, ГмбХ), Sportplatzstr. 3, 84381
Johanniskirchen, Germany (Германия)

IP20

Уполномоченный представитель производителя:

Общество с ограниченной ответственностью
«Медицинская Инвестиционная Компания»

Россия, 443087, Самарская область, г. Самара, пр-кт
Карла Маркса, д. 356, кв. 176.

Тел.: +7 (846) 203-17-84

РУ № _____ от _____

Стойка медицинская для аппаратуры Symbio-cart, 40-40U, W650



ITD GmbH (Ай Ти Ди, ГмбХ), Sportplatzstr. 3, 84381
Johanniskirchen, Germany (Германия)

IP20

Уполномоченный представитель производителя:

Общество с ограниченной ответственностью
«Медицинская Инвестиционная Компания»

Россия, 443087, Самарская область, г. Самара, пр-кт
Карла Маркса, д. 356, кв. 176.

Тел.: +7 (846) 203-17-84

РУ № _____ от _____

Адаптер, 16 мм



ITD GmbH (Ай Ти Ди, ГмбХ), Sportplatzstr. 3, 84381
Johanniskirchen, Germany (Германия)

Уполномоченный представитель производителя:
Общество с ограниченной ответственностью
«Медицинская Инвестиционная Компания»
Россия, 443087, Самарская область, г. Самара, пр-кт
Карла Маркса, д. 356, кв. 176.
Тел.: +7 (846) 203-17-84

РУ № _____ от _____

11. Упаковка

Медицинское изделие упаковывается в блоки из пеноматериала (с углублениями сверху и снизу от стойки, а также дополнительные блоки сбоку), затем укладывается в картонную коробку для транспортировки и хранения. Со стойкой в транспортную упаковку складываются все необходимые принадлежности.

12. Требования к монтажу и установке медицинского изделия

После распаковки приборных тележек vexio-cart необходимо сразу же проверить по прилагаемой накладной наличие всех комплектующих деталей.

Загрузка

Установите приборную тележку vexio-cart на ровную поверхность. Установите на тележку приборы. Во время погрузки и монтажа тележка не должна быть подключена к сети. Для фиксации отдельных приборов мы рекомендуем использовать дополнительные аксессуары (например, натяжной ремень).

Последовательность загрузки

Убедитесь в том, что все установленные на приборную тележку vexio-cart аппараты надёжно зафиксированы от сдвига, опрокидывания, падения с тележки и т.п. (также во время транспортировки). Любые тяжёлые приборы или

аксессуары на тележке vexio-cart рекомендуется размещать вдвоём. Необходимо также учитывать тот факт, что при нагрузке тележки изменится её центр тяжести.

Загрузку тележки необходимо производить в следующем порядке:

- Полки и выдвижные ящики нагружают снизу вверх;
- Консольные полки нагружают последними.

Разгрузку тележки необходимо производить в следующем порядке:

- Первыми разгружают консольные полки;
- Полки и выдвижные ящики разгружают сверху вниз.

Если тележку необходимо поднять или спустить на другой этаж без использования лифта или иного подъёмника, её необходимо разобрать на отдельные транспортабельные детали.

На приборных тележках vexio-cart без развязывающего трансформатора дополнительные (опционные) консольные полки можно монтировать только в том случае, если предварительно под основанием будет установлен противовес (поставляется опционно). Перед перемещением приборной тележки vexio-cart все консольные полки должны быть убраны (свёрнуты) и зафиксированы. При несоблюдении данного требования возникает опасность опрокидывания.

Устойчивость

Проверьте устойчивость тележки, убедившись, что полностью нагруженная тележка не опрокидывается ни в одном из четырёх направлений, стоя на поверхности с наклоном в 10° . Если устойчивость не является достаточной, тележку необходимо снабдить соответствующей маркировкой 5° .

Ролики

Приборные тележки vexio-cart снабжены сдвоенными роликами с тормозами. Перед вводом в эксплуатацию приборной тележки vexio-cart необходимо проверить, корректно ли функционирует блокировочное устройство. После постановки приборной тележки в положение стоянки, а также при её остановке необходимо привести в действие все четыре тормозных устройства роликов (блокировочное устройство роликов). Соответственно перед транспортировкой все тормозные устройства необходимо отпустить.

Убедитесь в том, что ролики обладают достаточной силой для удержания на поверхности с наклоном 10° нагруженную тележку. Если устойчивость не является достаточной, тележку необходимо снабдить соответствующей маркировкой 5° .

Каждые 12 месяцев необходимо проверять опорные ролики на предмет надёжности, а также на отсутствие сколов и прочность посадки болтов крепления роликов. При обнаружении таких дефектов необходимо незамедлительно обратиться к вашему поставщику.

Нагрузка

Несмотря на соблюдение всех мер предосторожности для обеспечения максимальной устойчивости тележки, во избежание несчастных случаев следует обращать внимание на неровности пола, дверную коробку лифта, кабели и т.п.

Для обеспечения устойчивости во время транспортировки необходимо снять монитор и транспортировать его отдельно.

Нельзя выходить за пределы грузоподъемности приборной тележки vexio-cart. Не нагружайте приборную тележку vexio-cart больше, чем предусмотрено её грузоподъемностью.

Полки

Полки тележки можно извлекать и устанавливать в другое место. Чтобы извлечь полку, необходимо вначале ослабить крепёжные винты. Поставив полку на новое место, необходимо винты затянуть. После этого требуется проверить сопротивление защитного провода.

Развязывающий трансформатор

Развязывающий трансформатор устанавливают на заводе-изготовителе под основанием тележки.

Установка компонентов

К установке компонентов приборной тележки ITD допускается только специально подготовленный персонал. При этом тележку необходимо проверить на устойчивость к опрокидыванию.

13. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия

Стойки медицинские и принадлежности

Основными неисправностями стоек и принадлежностей являются износ трущихся деталей, царапины, трещины и изломы внешней поверхности изделий, ослабление блокирующего механизма колес, ослабление фиксации принадлежностей на стойке. На величину и интенсивность износов и повреждений решающее влияние оказывают правильные условия эксплуатации, хранения и транспортирования, регулярная очистка и дезинфекция, своевременное выявление и устранение неисправностей.

Техническое обслуживание стоек и принадлежностей, которое может проводиться медицинским персоналом, подразумевает периодическую процедуру очистки в сочетании с процедурой дезинфекции (см. Раздел 18) и периодический (раз в месяц) осмотр внешнего вида изделий на наличие каких-либо повреждений и опробование изделий для определения возможности функционировать в соответствии с назначением.

Ниже приведены примеры проверок эксплуатационных характеристик деталей медицинского изделия:

Держатели монитора:

- Повороты и наклоны выполняются безупречно, без больших зазоров. Устройство регулирования по высоте (при наличии) функционирует свободно, подъёмная сила соответствует весу приборов.

Полки, ящики, держатели:

- Проверьте, надёжно ли затянуты крепёжные винты (благодаря этому компоненты держатся ровно и стабильно).

Колеса:

- Проверить свободное перемещение колес и работу всех тормозов.
- Проверьте, плотно ли сидят 4 болта, которыми крепятся колеса к нижней стороне основания, а также, прочно ли сидят сами колеса в своих креплениях.
- Если колеса являются электропроводящими, необходимо содержать рабочие поверхности в чистоте, чтобы обеспечивать функционирование роликов.

Блоки штепсельных розеток:

- Проверьте главный кабель на предмет повреждений и прочность посадки.

Внимание! При обнаружении каких-либо неисправностей и дефектов прекратить использование изделия и обратиться к официальному представителю производителя. Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Если будет обнаружена попытка самостоятельно устранить неисправность, гарантия аннулируется. Исходя из соображений безопасности, работы по ремонту может выполнять только производитель. Предварительно каждому ремонту или отправке на ремонт изделия должны пройти чистку и дезинфекцию с использованием подходящего средства!

Изолирующий трансформатор и индикатор утечки тока ELG

Техническое обслуживание изолирующего трансформатора и индикатора утечки тока ELG, которое может проводиться медицинским персоналом, подразумевает периодическое автоматическое или ручное тестирование для подтверждения корректности работы изделий.

Тестирование проводится следующим образом:

Переведите главный выключатель изолирующего трансформатора в положение ВКЛ (ON), в течение 5 секунд индикатор утечки тока ELG автоматически произведёт автотестирование.

По окончании автотестирования индикатор утечки тока ELG будет готов к работе. Зелёный светодиодный индикатор будет гореть, не мигая. Этот тест производится автоматически каждые 8 часов. Его можно также запустить вручную с помощью кнопки Test.

При проведении теста вручную выполняется следующее:

- Моделируется нарушение изоляции – примерно на 5 секунд загорается без миганий жёлтый светодиодный индикатор, сигнализирующий нарушение

изоляции, и в течение 5 секунд продолжительно звучит предупреждающий сигнал мощностью 2,4 кГц.

- Затем моделируется нарушение температурного режима – примерно на 5 секунд загорается без миганий жёлтый светодиодный индикатор, сигнализирующий нарушение температурного режима, и в течение 5 секунд прерывисто звучит предупреждающий сигнал мощностью 2,4 кГц.

Сбой распознаётся следующим образом:

- При обнаружении нарушения изоляции жёлтый светодиодный индикатор сопротивления изоляции загорается, не мигая, также непрерывно звучит предупреждающий сигнал мощностью 2,4 кГц. Предупреждающий звуковой сигнал можно убрать с помощью кнопки сброса Reset. Светодиодный индикатор будет гореть, пока не будет устранена ошибка.

- Если индикатор утечки тока будет выключен, а сбой за это время не будет устранён, вышеназванные операции начнутся сначала. После обнаружения и последующего устранения нарушения изоляции акустическое и оптическое отображение аварийного сигнала не прекратится до сброса (кнопка Reset):

При первом нажатии на кнопку сброса будет выключен акустический аварийный сигнал.

При втором нажатии на кнопку сброса будет выключен оптический аварийный сигнал.

- При обнаружении нарушения температурного режима загорается без миганий жёлтый светодиодный индикатор, обозначающий превышение допустимой температуры, предупреждающий звуковой сигнал мощностью 2,4 кГц звучит прерывисто. Звуковой сигнал можно убрать с помощью кнопки сброса Reset. При этом светодиодный индикатор будет продолжать гореть до устранения сбоя. Если индикатор утечки тока будет выключен, а сбой за это время не будет устранён, вышеназванные операции начнутся сначала.

- При одновременном обнаружении нарушений изоляции и температурного режима приоритет в отношении акустического аварийного сигнала получает предупреждение об обнаружении нарушения изоляции.

Индикатор утечки тока кроме автотестирования, инициируемого нажатием кнопки Test, также регулярно автоматически выполняет автотестирование примерно каждые 8 часов. Этот тест выполняется также при каждом включении. Автотестирование длится примерно 5 секунд незаметно для пользователя. При обнаружении сбоя начинает мигать зелёный светодиодный индикатор с частотой 0,5 Гц. С такой же частотой подаётся акустический аварийный сигнал. Аварийные сообщения невозможно убрать с помощью кнопки сброса Reset.

Внимание! При обнаружении каких-либо неисправностей и дефектов прекратить использование изделия и обратиться к официальному представителю производителя. Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Если будет обнаружена попытка самостоятельно устранить неисправность, гарантия аннулируется. Исходя из соображений безопасности, работы по ремонту может выполнять только производитель.

Устранение неисправностей

Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Если будет обнаружена попытка самостоятельно устранить неисправность, гарантия аннулируется. Исходя из соображений безопасности, работы по ремонту и техническому обслуживанию может выполнять только производитель.

Примечание:

Дополнительные технические данные и более подробную информацию необходимо смотреть в прилагаемых к изделию отдельных руководствах по эксплуатации развязывающих трансформаторов и приборов контроля сопротивления изоляции.

14. Условия транспортировки и хранения

	Температура окружающей среды	Относительная влажность	Атмосферное давление
Эксплуатация	от +10°C до +40°C	30% - 75%	700-1060 гПа
Хранение	от -20°C до +70°C	10% - 95%	700-1060 гПа
Транспортирование	от -20°C до +70°C	10% - 95%	700-1060 гПа

Транспортировка

Перед мобильным применением приборной тележки необходимо обеспечить следующее:

- Фиксация против падения всех находящихся на тележке приборов и продуктов.
- Все консольные полки должны быть убраны (свёрнуты) и зафиксированы.
- Провод подключения к сети должен быть извлечён из местного источника электропитания.
- Тормоза роликов должны быть отпущены.

Максимально допустимая скорость перемещения приборной тележки составляет 6 км/ч. При переезде через пороги, кабели и шланги скорость необходимо значительно снижать.

При проезде по пандусу с максимальным наклоном $<10^\circ$ необходимо обеспечить возможность остановки приборной тележки в любой момент.

15. Срок службы

Средний срок службы медицинского изделия составляет 10 лет. Срок хранения 10 лет.

16. Утилизация

Утилизацию стойки необходимо осуществлять в соответствии с национальными нормами и директивами по утилизации старых электрических и электронных приборов.

На территории РФ утилизация осуществляется в соответствии с нормами СанПиН 2.1.3684-21, как отходы класса А.

Если вам требуется дополнительная информация о пунктах сбора, переработки и утилизации, пожалуйста, обратитесь в службу по утилизации местного городского управления. Вы также можете связаться с ближайшим представительством нашей компании для получения дополнительной информации об экологических характеристиках и утилизации наших продуктов.

Внимание! Запрещается утилизировать электронные/электрические компоненты медицинского изделия вместе с обычными бытовыми отходами. Перед утилизацией изделие необходимо очистить и продезинфицировать.

17. Гарантия изготовителя

Производитель гарантирует первоначальному покупателю, что медицинское изделие, не включая принадлежности, не должно иметь дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании в соответствии с руководством по эксплуатации в течение одного года с фактической даты продажи первоначальному покупателю.

КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

Данная гарантия не распространяется на обычный износ, амортизацию и обслуживание изделия, и не распространяется на любые дополнительные изделия или оборудование, используемые с медицинским изделием.

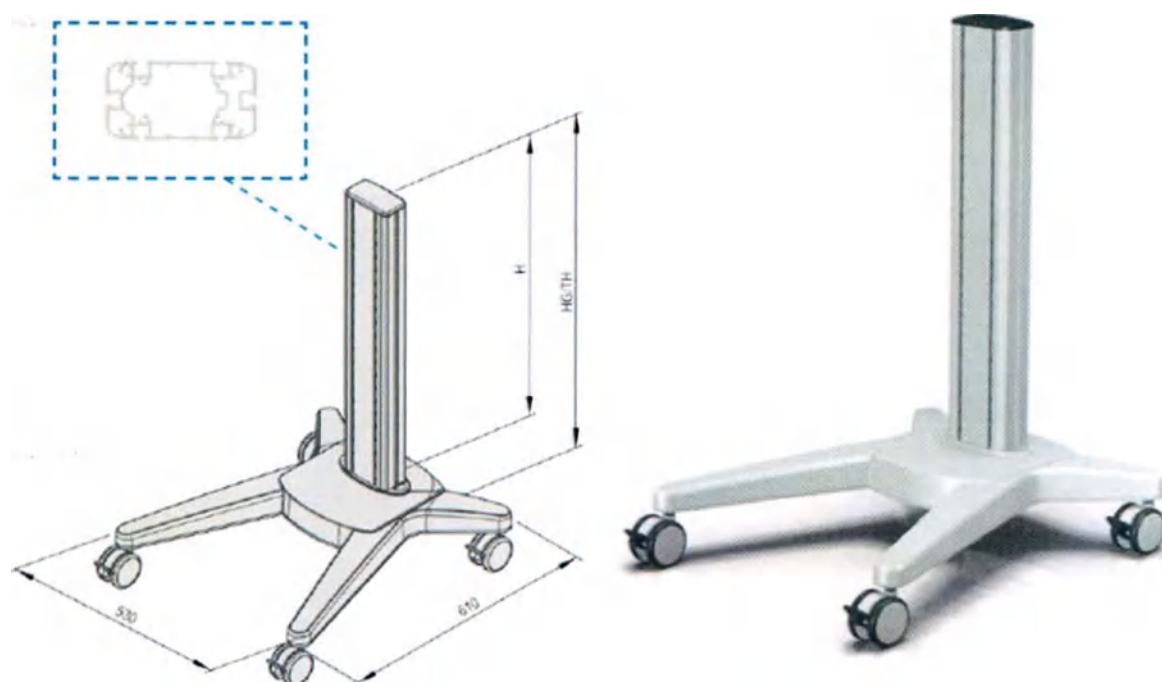
В соответствии с условиями и при условии выполнения этой ограниченной гарантии производитель обязуется осуществлять бесплатный ремонт или замену по своему усмотрению (за исключением минимальной оплаты за доставку и обработку) любого дефектного медицинского изделия (не включая принадлежности), если претензия поступила на протяжении одного года после приобретения.

Гарантийный срок хранения: 10 лет с фактической даты продажи первоначальному покупателю.

Гарантийный срок эксплуатации: 10 лет с фактической даты продажи первоначальному покупателю.

18. Основные технические характеристики

Стойки медицинские для аппаратуры Vexio-cart Economy



H - Высота установки (монтажная высота)

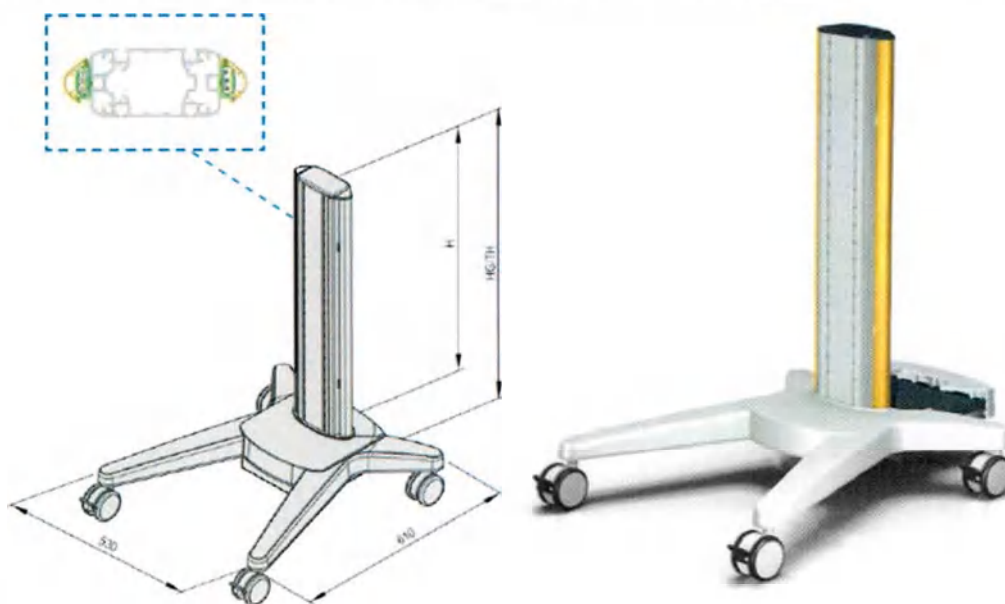
HG/TH - Общая высота

Рис. 1. Внешний вид стойки Vexio-cart Economy

Вариант исполнения	Параметр
21 U	Общая высота: 830 мм; ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 140 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 672 мм; Грузоподъемность: 65 кг; Диаметр колес: 75 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 7035, светло серое порошковое покрытие.
25 U	Общая высота: 998 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 160 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 800 мм; Грузоподъемность: 65 кг; Диаметр колес: 100 мм;

	Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 7035, светло серое порошковое покрытие.
30 U	Общая высота: 1160 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 180 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 960 мм; Грузоподъемность: 65 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 7035, светло серое порошковое покрытие.
35 U	Общая высота: 1320 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 200 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 1120 мм; Грузоподъемность: 65 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 7035, светло серое порошковое покрытие.

Стойки медицинские для аппаратуры Vexio-cart Profi



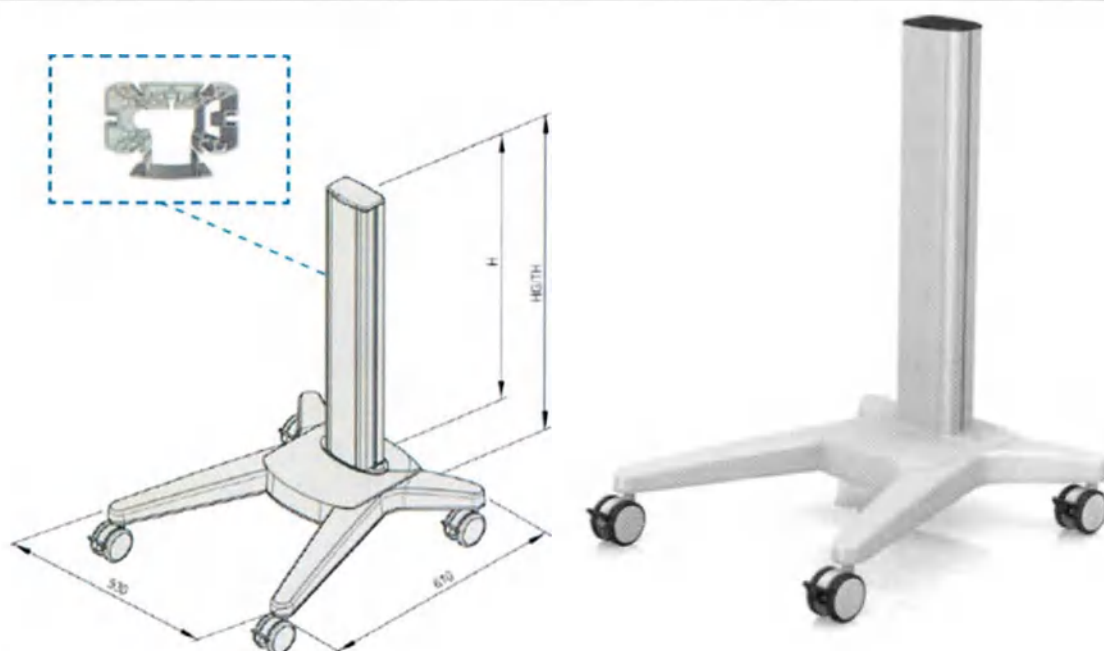
H - Высота установки (монтажная высота)

HG/TH - Общая высота

Рис. 2. Внешний вид стойки Vexio-cart Profi

21 U	Общая высота: 830 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 140 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 672 мм; Грузоподъемность: 65 кг;
------	--

	Диаметр колес: 75 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 7035, светло серое порошковое покрытие.
25 U	Общая высота: 998 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 160 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 800 мм; Грузоподъемность: 65 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 7035, светло серое порошковое покрытие.
30 U	Общая высота: 1160 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 180 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 960 мм; Грузоподъемность: 65 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL, 7035 светло серое порошковое покрытие.
35 U	Общая высота: 1320 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 200 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 1120 мм; Грузоподъемность: 65 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 7035, светло серое порошковое покрытие.
Стойки медицинские для аппаратуры Vexio-cart Plus	



H - Высота установки (монтажная высота)

HG/TH - Общая высота

Рис. 3. Внешний вид стойки Vexio-cart Plus

21 U	Общая высота: 830 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 140 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 672 мм; Грузоподъемность: 65 кг; Диаметр колес: 75 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 7035, светло серое порошковое покрытие.
25 U	Общая высота: 998 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 160 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 800 мм; Грузоподъемность: 65 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 7035, светло серое порошковое покрытие.
30 U	Общая высота: 1160 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 180 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 960 мм; Грузоподъемность: 65 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий;

	Отделка: RAL, 7035 светло серое порошковое покрытие.
35 U	Общая высота: 1320 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 200 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 1120 мм; Грузоподъемность: 65 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 7035, светло серое порошковое покрытие.

Стойки медицинские для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты



H - Высота установки (монтажная высота)
HG/TH - Общая высота

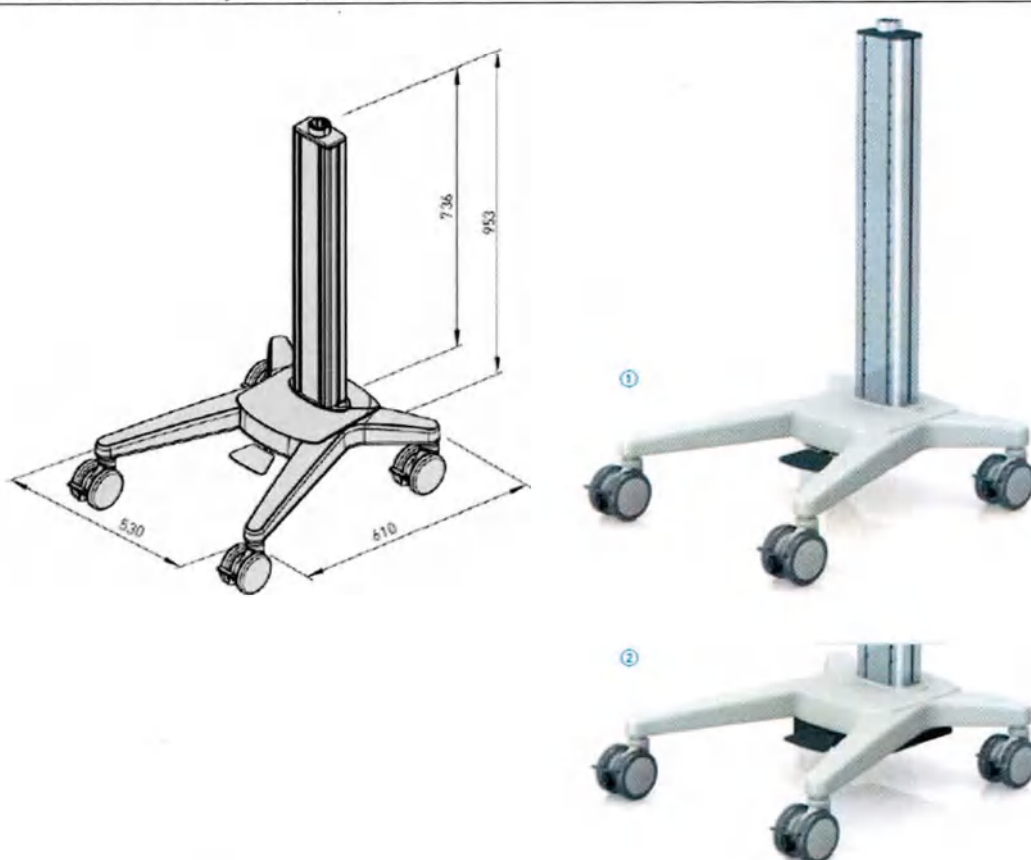
Рис. 4. Внешний вид стойки Vexio-cart с механической регулировкой высоты

35 U, 3 – 10 кг	Общая высота: 1320 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 200 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 1120 мм; Грузоподъемность общая: 65 кг; Грузоподъемность регулируемой части стойки: 3-10 кг; Диапазон регулировки высоты: 300 мм; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: - опорная стойка: анодированная,
-----------------	--

	- основание: светло-серое порошковое покрытие RAL 7035.
35 U, 10 – 16 кг	Общая высота: 1320 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 200 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 1120 мм; Грузоподъемность общая: 65 кг; Грузоподъемность регулируемой части стойки: 10-16 кг; Диапазон регулировки высоты: 300 мм; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: - опорная стойка: анодированная, - основание: светло-серое порошковое покрытие RAL 7035.
40 U, 3 – 10 кг	Общая высота: 1480 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 220 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 1280 мм; Грузоподъемность общая: 65 кг; Грузоподъемность регулируемой части стойки: 3-10 кг; Диапазон регулировки высоты: 300 мм; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: - опорная стойка: анодированная, - основание: светло-серое порошковое покрытие RAL 7035.
40 U, 10 – 16 кг	Общая высота: 1480 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 220 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 1280 мм; Грузоподъемность общая: 65 кг; Грузоподъемность регулируемой части стойки: 10-16 кг; Диапазон регулировки высоты: 500 мм; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: - опорная стойка: анодированная, - основание: светло-серое порошковое покрытие RAL 7035.
45 U, 3 – 10 кг	Общая высота: 1640 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 240 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 1440 мм; Грузоподъемность общая: 65 кг; Грузоподъемность регулируемой части стойки: 3-10 кг; Диапазон регулировки высоты: 300 мм; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: - опорная стойка: анодированная,

	- основание: светло-серое порошковое покрытие RAL 7035.
45 U, 10 – 16 кг	Общая высота: 1640 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 240 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 1440 мм; Грузоподъемность общая: 65 кг; Грузоподъемность регулируемой части стойки: 10-16 кг; Диапазон регулировки высоты: 500 мм; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: - опорная стойка: анодированная, - основание: светло-серое порошковое покрытие RAL 7035.

Стойки медицинские для аппаратуры Vexio-cart с механической регулировкой высоты, с педалью



- 1 – без электрического ящика;
2 – с электрическим ящиком.

Рис. 5. Внешний вид стойки Vexio-cart с механической регулировкой высоты, с педалью

3 – 10 кг	Общая высота: 953 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 150 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н.
-----------	---

	Высота установки (монтажная высота): 736 мм; Грузоподъемность общая: 65 кг; Грузоподъемность регулируемой части стойки: 3-10 кг; Диапазон регулировки высоты: 300 мм; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: - опорная стойка: анодированная, - основание: светло-серое порошковое покрытие RAL 7035.
8 – 14 кг	Общая высота: 953 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 160 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 736 мм; Грузоподъемность общая: 65 кг; Грузоподъемность регулируемой части стойки: 8-14 кг; Диапазон регулировки высоты: 500 мм; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: - опорная стойка: анодированная, - основание: светло-серое порошковое покрытие RAL 7035.
с электрическим ящиком, 3 – 10 кг	Общая высота: 953 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 155 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 736 мм; Грузоподъемность общая: 65 кг; Грузоподъемность регулируемой части стойки: 3-10 кг; Диапазон регулировки высоты: 300 мм; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: - опорная стойка: анодированная, - основание: светло-серое порошковое покрытие RAL 7035.
с электрическим ящиком, 8 – 14 кг	Общая высота: 953 мм; Общая ширина: 530 мм; Общая глубина: 610 мм; Масса: не более 165 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Высота установки (монтажная высота): 736 мм; Грузоподъемность общая: 65 кг; Грузоподъемность регулируемой части стойки: 8-14 кг; Диапазон регулировки высоты: 500 мм; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: - опорная стойка: анодированная, - основание: светло-серое порошковое покрытие RAL 7035.

Стойки медицинские для аппаратуры Symbio-cart



H - Высота установки (монтажная высота)

TH - Общая высота

W – Монтажная ширина

Рис. 1. Внешний вид стойки Symbio-cart

Вариант исполнения	Параметр
25-25U W450	Общая высота: 977 мм; Общая ширина: 624 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 150 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 450 мм; Высота установки (монтажная высота): 800 мм; Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
25-25U W500	Общая высота: 977 мм; Общая ширина: 674 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 155 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 500 мм; Высота установки (монтажная высота): 800 мм; Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
25-25U W650	Общая высота: 977 мм; Общая ширина: 824 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 160 кг.

	Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 650 мм; Высота установки (монтажная высота): 800 мм; Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
30-30U W450	Общая высота: 1137 мм; Общая ширина: 624 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 160 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 450 мм; Высота установки (монтажная высота): 960 мм; Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
30-30U W500	Общая высота: 1137 мм; Общая ширина: 674 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 165 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 500 мм; Высота установки (монтажная высота): 960 мм; Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
30-30U W650	Общая высота: 1137 мм; Общая ширина: 824 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 170 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 650 мм; Высота установки (монтажная высота): 960 мм; Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
35-35U W450	Общая высота: 1297 мм; Общая ширина: 624 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 170 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 450 мм; Высота установки (монтажная высота): 1120 мм; Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
35-35U	Общая высота: 1297 мм;

W500	Общая ширина: 674 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 175 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 500 мм; Высота установки (монтажная высота): 1120 мм; Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
35-35U W650	Общая высота: 1297 мм; Общая ширина: 824 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 180 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 650 мм; Высота установки (монтажная высота): 1120 мм; Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
40-40U W450	Общая высота: 1457 мм; Общая ширина: 624 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 180 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 450 мм; Высота установки (монтажная высота): 1280 мм; Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
40-40U W500	Общая высота: 1457 мм; Общая ширина: 674 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 185 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 500 мм; Высота установки (монтажная высота): 1280 мм; Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
40-40U W650	Общая высота: 1457 мм; Общая ширина: 824 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 190 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 650 мм; Высота установки (монтажная высота): 1280 мм; Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм;

Материал: сталь/алюминий;
Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.

Стойки медицинские для аппаратуры Symbio-cart Plus



H - Высота установки (монтажная высота)

TH - Общая высота

W – Монтажная ширина

Рис. 2. Внешний вид стойки Symbio-cart Plus

25-30U W450	Общая высота: 1137 мм; Общая ширина: 624 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 165 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 450 мм; Высота установки (монтажная высота): 800/960 мм (боковые колонны / центральная колонна). Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
25-30U W500	Общая высота: 1137 мм; Общая ширина: 674 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 170 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 500 мм; Высота установки (монтажная высота): 800/960 мм (боковые колонны / центральная колонна). Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм;

	Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
25-30U W650	Общая высота: 1137 мм; Общая ширина: 824 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 175 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 650 мм; Высота установки (монтажная высота): 800/960 мм (боковые колонны / центральная колонна). Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
30-35U W450	Общая высота: 1297 мм; Общая ширина: 624 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 175 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 450 мм; Высота установки (монтажная высота): 960/1120 мм (боковые колонны / центральная колонна). Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
30-35U W500	Общая высота: 1297 мм; Общая ширина: 674 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 180 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 500 мм; Высота установки (монтажная высота): 960/1120 мм (боковые колонны / центральная колонна). Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
30-35U W650	Общая высота: 1297 мм; Общая ширина: 824 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 185 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 650 мм; Высота установки (монтажная высота): 960/1120 мм (боковые колонны / центральная колонна). Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
35-40U W450	Общая высота: 1457 мм; Общая ширина: 624 мм;

	Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 185 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 450 мм; Высота установки (монтажная высота): 1120/1280 мм (боковые колонны / центральная колонна). Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
35-40U W500	Общая высота: 1457 мм; Общая ширина: 674 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 190 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 500 мм; Высота установки (монтажная высота): 1120/1280 мм (боковые колонны / центральная колонна). Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
35-40U W650	Общая высота: 1457 мм; Общая ширина: 824 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 195 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 650 мм; Высота установки (монтажная высота): 1120/1280 мм (боковые колонны / центральная колонна). Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
40-45U W450	Общая высота: 1617 мм; Общая ширина: 624 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 195 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 450 мм; Высота установки (монтажная высота): 1280/1440 мм (боковые колонны / центральная колонна). Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
40-45U W500	Общая высота: 1617 мм; Общая ширина: 674 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 200 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 500 мм;

	Высота установки (монтажная высота): 1280/1440 мм (боковые колонны / центральная колонна). Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.
40-45U W650	Общая высота: 1617 мм; Общая ширина: 824 мм; Общая глубина: 626 мм; Масса: не более 205 кг. Усилие перемещения: не более 200 Н. Монтажная ширина: 650 мм; Высота установки (монтажная высота): 1280/1440 мм (боковые колонны / центральная колонна). Грузоподъемность: 180 кг; Диаметр колес: 100 мм; Материал: сталь/алюминий; Отделка: RAL 9016 транспортный белый, с порошковым покрытием.

Примечание: допуски на технические характеристики составляют $\pm 5\%$, если не указано иное.

Трансформаторы для стоек Vexio-cart Economy и Vexio-cart Plus	
Мощность, макс.	660 ВА
Входное / выходное напряжение	115 В / 115 В или 230 В / 230 В, 50 Гц / 60 Гц (переключаемое напряжение)
Входное соединение (разъем)	IEC 60320-1 C14 разъем для подключения линий электроснабжения в конкретных странах
Конструкция	Тороидальный трансформатор
Защита от короткого замыкания	В соответствии с IEC 61558-1
Ограничение пускового тока	С электронным регулированием до 15 А
Напряжение изоляции (выдерживаемое напряжение)	PRI – земля: 1500 В переменного тока, SEC – земля: 1500 В переменного тока, PRI – SEC: 4000 В переменного тока. * PRI = Primary; SEC = Secondary, напряжение на первичной обмотке/на вторичной обмотке
Предохранитель	Первичный, 2-полюсный с тонкопроволочным предохранителем
Материал	Сталь / медь
Покрытие	светло-серое порошковое покрытие RAL 7035
Комплект поставки	1 изолирующий трансформатор с мощностью 660 ВА; 1 кабель питания Schuko, 5 м (10 А / 250 В переменного тока); 1 кабель с разъёмами IEC 60320-1 для подключения 3-х устройств.
Габаритные размеры	293 x 199,5 x 99 мм ($\pm 5\%$)
Масса	10,4 кг ($\pm 5\%$)
Трансформаторы для стоек Symbio-cart и Symbio-cart Plus	
Мощность, макс.	1200 ВА / 1600 ВА / 2000 ВА

Входное / выходное напряжение	при 1200 ВА / 1600 ВА: 115 В / 115 В или 230 В / 230 В, 50 Гц / 60 Гц (переключаемое напряжение); при 2000 ВА: 230 В / 230 В, 50 Гц / 60 Гц
Входное соединение (разъем)	IEC 60320-1 C14 разъем для подключения линий электроснабжения в конкретных странах
Конструкция	Тороидальный трансформатор
Защита от короткого замыкания	В соответствии с IEC 61558-1
Ограничение пускового тока	Электронное управление при номинальном токе
Напряжение изоляции (выдерживаемое напряжение)	PRI – земля: 1500 В переменного тока, SEC – земля: 1500 В переменного тока, PRI – SEC: 4000 В переменного тока. * PRI = Primary; SEC = Secondary, напряжение на первичной обмотке/на вторичной обмотке
Предохранитель	Первичный, 2-полосный с тонкопроволочным предохранителем
Материал	Сталь / медь
Покрытие	белое порошковое покрытие RAL 9016
Комплект поставки	1 изолирующий трансформатор с мощностью 1200 ВА, 1600 ВА или 2000 ВА; 1 кабель питания Schuko: длина - 5 м, вилка питания - CEE7 / VII, номинальные параметры питания - 10 А / 250 В переменного тока, розетки питания (вход/ выход).
Габаритные размеры	367 x 295 x 98,5 мм (± 5%)
Масса	1200 ВА: 14,5 кг (± 5%); 1200 ВА + ELG: 14,8 кг (± 5%) 1600 ВА: 16,0 кг (± 5%); 1600 ВА + ELG: 16,3 кг (± 5%) 2000 ВА: 23,5 кг (± 5%); 2000 ВА + ELG: 23,8 (± 5%)

Информация о плавких предохранителях:

2 x T 3,15 A/час, 230 В
2 x T 6,3 A/час, 115 В

Индикатор утечки тока

Индикатор утечки тока (Earth Leakage Guard / ELG) предназначен для контроля сопротивления изоляции приборов или групп приборов, подключаемых к изолирующим трансформаторам. Одновременно контролируется температурный режим трансформатора. Анализ данных производит процессор. Индикатор утечки тока генерирует визуальный и акустический сигнал,

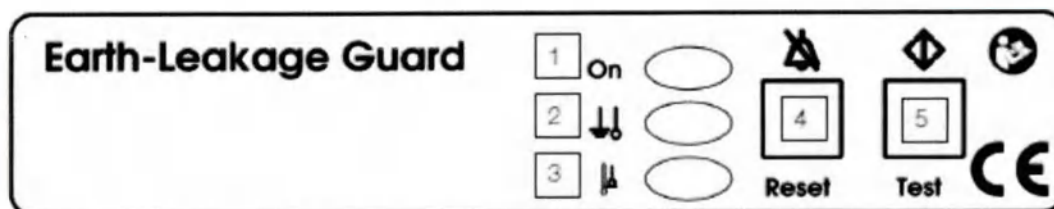
который делает падение сопротивления изоляции всей системы узнаваемым, когда она достигает критической области с помощью светодиодов и звука.

На трансформаторах с встроенным индикатором утечки тока в корпусе трансформатора установлен блок предварительной обработки результатов измерения. Панель управления находится на одной из полок. Оба компонента соединены друг с другом посредством вертикально проходящего интерфейсного кабеля.



Панель управления индикатором утечки тока, встроенная в полку

Ниже приведено изображение панели управления индикатора:

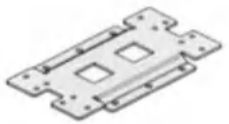


1 Питание (зелёный)	4 Сброс (Reset)
2 Сопротивление изоляции (жёлтый)	5 Test (Test)
3 Превышение допустимой температуры (жёлтый)	

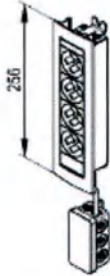
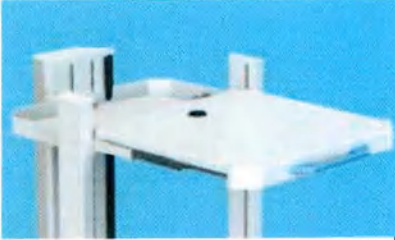
Панель управления индикатора утечки тока

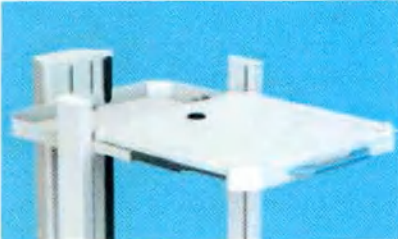
Принадлежности

Наименование	Характеристики	Фото
Адаптер GE, W140	Адаптер представляет собой крепёжную пластину, которая используется вместе с универсальным адаптером для крепления монитора. Разные адаптеры подходят к мониторам соответствующих производителей. Пластина оснащена дополнительными запирающими штифтами для дополнительной безопасности. Материал: алюминий. Грузоподъёмность: до 14 кг. Покрытие: анодированное. Комплект поставки: 1 крепёжная пластина и крепёж.	

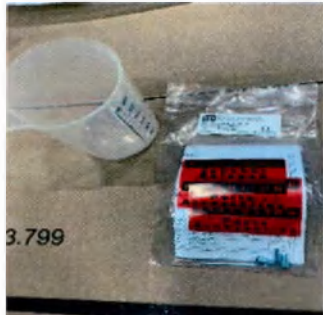
Адаптер Mindray, W215	Адаптер представляет собой крепёжную пластину, которая используется вместе с универсальным адаптером для крепления монитора. Разные адаптеры подходят к мониторам соответствующих производителей. Пластина оснащена дополнительными запирающими штифтами для дополнительной безопасности. Материал: алюминий. Грузоподъёмность: до 14 кг. Покрытие: анодированное. Комплект поставки: 1 крепёжная пластина и крепёж.	
Адаптер Nihon Kohden, W205	Адаптер представляет собой крепёжную пластину, которая используется вместе с универсальным адаптером для крепления монитора. Разные адаптеры подходят к мониторам соответствующих производителей. Пластина оснащена дополнительными запирающими штифтами для дополнительной безопасности. Материал: алюминий. Грузоподъёмность: до 14 кг. Покрытие: анодированное. Комплект поставки: 1 крепёжная пластина и крепёж.	
Адаптер Nihon Kohden, W214	Адаптер представляет собой крепёжную пластину, которая используется вместе с универсальным адаптером для крепления монитора. Разные адаптеры подходят к мониторам соответствующих производителей. Пластина оснащена дополнительными запирающими штифтами для дополнительной безопасности. Материал: алюминий. Грузоподъёмность: до 14 кг. Покрытие: анодированное. Комплект поставки: 1 крепёжная пластина и крепёж.	
Адаптер Schiller, W122	Адаптер представляет собой крепёжную пластину, которая используется вместе с универсальным адаптером для крепления монитора. Разные адаптеры подходят к мониторам соответствующих производителей. Пластина оснащена дополнительными запирающими штифтами для дополнительной безопасности. Материал: алюминий. Грузоподъёмность: до 14 кг. Покрытие: анодированное. Комплект поставки: 1 крепёжная пластина и крепёж.	
Адаптер Spacelabs, W127	Адаптер представляет собой крепёжную пластину, которая используется вместе с универсальным адаптером для крепления монитора. Разные адаптеры подходят к мониторам соответствующих производителей. Пластина оснащена дополнительными запирающими штифтами для дополнительной безопасности. Материал: алюминий. Грузоподъёмность: до 14 кг.	

	Покрытие: анодированное. Комплект поставки: 1 крепёжная пластина и крепёж. Габаритные размеры: 127 мм x 127 мм.	
Адаптер, 16 мм	Адаптер используется для присоединения аксессуаров. Внутренний диаметр шейки вала: 16 мм. Внешний диаметр шейки вала: 24 мм. Масса: 150 г ± 1%. Материал: алюминий / пластик ABS; Комплект поставки: 1 адаптер и крепёж, подходящие к крепежу насадки.	
Адаптер, 18 мм	Адаптер используется для присоединения аксессуаров. Внутренний диаметр шейки вала: 18 мм. Внешний диаметр шейки вала: 24 мм. Масса: 160 г ± 1%. Материал: алюминий / пластик ABS; Комплект поставки: 1 адаптер и крепёж, подходящие к крепежу насадки.	
Адаптеры для кабелей, 0,3 м	Переходный кабель с вилкой и разветвителем. Подключение: Schuko вилка --> EURO розетка. Комплект поставки: 1 адаптер. Длина: 0,3 м.	
Бампер	Защита колес. Комплект поставки: 4 штуки. Диаметр: 95 мм. Высота: 50 мм. Масса: 0,2 г ± 1%. (1 штука)	
Блок розеток, 3 разъема	Штекерная розетка Schuko, 3 розетки. Электропитание: макс. 16 А / 250 В переменного тока. Габаритные размеры блока: 56 x 185 x 41 мм. Длина кабеля: 3 м. Масса: 0,4 кг ± 1%.	
Блок розеток, 6 разъемов	Штекерная розетка Schuko, 6 розеток, с внешней линией заземления Электропитание: макс. 16 А/250 В переменного тока. Габаритные размеры блока: 45 x 340 x 43 мм. Длина кабеля: 5 м. Масса: 0,5 кг ± 1%.	
Блок розеток, 8 разъемов	Штекерная розетка Schuko, 8 розеток, с внешней линией заземления Электропитание: макс. 16 А/250 В переменного тока. Габаритные размеры блока: 45 x 440 x 43 мм. Длина кабеля: 5 м. Масса: 0,6 кг ± 1%.	

Блок розеток, 8 разъемов, с переключателем	Штекерная розетка Schuko, 8 розеток, с внешней линией заземления. Электропитание: макс. 16 А/250 В переменного тока. Габаритные размеры блока: 45 x 440 x 43 мм. Длина кабеля: 5 м. Масса: 0,6 кг ± 1%. Комплект поставки: блок розеток Schuko, включая переключатель включения/выключения (на медиа-колонне).	Блок розеток:  Переключатель на центральной медиа-колонне: 
Блоки розеток, 3 разъема, с выключателем и заземлением	Мощность: 16 А / 250 В АС. Размещение: внутри электрошкафа или электрического лотка. Комплект поставки: 1 блок розеток и крепёж. Габаритные размеры блока: 44 x 256 x 44 мм ± 5%. Масса: 0,5 кг ± 1%.	
Блоки розеток, 4 разъема, без выключателя	Мощность: 16 А / 250 В АС. Размещение: внутри электрошкафа или электрического лотка. Комплект поставки: 1 блок розеток и крепёж. Габаритные размеры блока: 45 x 256 x 45 мм. Масса: 0,5 кг ± 1%.	
Вращающийся держатель	Держатель можно прикрепить к поручням и к круглым балкам диаметром до Ø 38 мм. Подвижный держатель можно вращать в вертикальном или горизонтальном направлении. Грузоподъёмность: 5 кг. Материал: держатель: алюминий; крепёжная пластина: сталь. Покрытие: держатель анодированное; крепёжная пластина: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на стандартный бегунок или поручень. Комплект поставки: 1 держатель.	
Выдвижная полка W450	Выдвижная полка обеспечивает быстрый доступ к устройствам в случае сборки и обслуживания. Выдвижной выступ расширяется до 274 мм; Высота установки: 3 U (96 мм) / высота компонента: 62 мм. Ширина: 450 мм. Грузоподъёмность: распределенная нагрузка 15 кг. Материал: Сталь/алюминий.	

	Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 выдвижная полка, включая сборочный материал.	
Выдвижная полка W500	Выдвижная полка обеспечивает быстрый доступ к устройствам в случае сборки и обслуживания. Выдвижной выступ расширяется до 274 мм; Высота установки: 3 U (96 мм) / высота компонента: 62 мм. Ширина: 500 мм. Грузоподъемность: распределенная нагрузка 15 кг. Материал: Сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 выдвижная полка, включая сборочный материал.	
Выдвижная полка W650	Выдвижная полка обеспечивает быстрый доступ к устройствам в случае сборки и обслуживания. Выдвижной выступ расширяется до 274 мм; Высота установки: 3 U (96 мм) / высота компонента: 62 мм. Ширина: 650 мм. Грузоподъемность: распределенная нагрузка 15 кг. Материал: Сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 выдвижная полка, включая сборочный материал.	
Выключатель с креплением колонне	Двухпозиционный переключатель может быть установлен только на базовую стойку vexio-cart "Plus". Габаритные размеры, см: коробка с выключателем – 9,5 x 5 x 4 Длина провода – 160 см Масса: 0,5 кг	
Держатель монитора двухплечевой, 0-14 кг, 348 мм, 348 мм	Особенности держателя: - эргономичный рычаг управления обеспечивает непрерывную регулировку шарнирного соединения; - широкий спектр деятельности обеспечивает обширное рабочее пространство в соответствии с моделью; - кабельные каналы большого объема позволяют размещать различные кабели; - используется для монтажа мониторов с адаптацией VESA 75/100; - может наклоняться на $\pm 20^\circ$, поворачиваться на $\pm 80^\circ$ и поворачиваться на $\pm 5^\circ$; Высота установки: 4 U (128 мм). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажное оборудование. Грузоподъемность: до 14 кг. Длина плечей: 348 мм и 348 мм.	

Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 348 мм	Особенности держателя: - эргономичный рычаг управления обеспечивает непрерывную регулировку шарнирного соединения; - кабельные каналы большого объема позволяют размещать различные кабели; - используется для монтажа мониторов с адаптацией VESA 75/100; - может наклоняться на $\pm 20^\circ$, поворачиваться на $\pm 80^\circ$ и поворачиваться на $\pm 5^\circ$; Высота установки: 4 U (128 мм). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажное оборудование. Грузоподъемность: до 14 кг. Длина плеча: 348 мм.	
Держатель монитора одноплечевой, 14-18 кг, 348 мм	Особенности держателя: - эргономичный рычаг управления обеспечивает непрерывную регулировку шарнирного соединения; - кабельные каналы большого объема позволяют размещать различные кабели; - используется для монтажа мониторов с адаптацией VESA 75/100; - может наклоняться на $\pm 20^\circ$, поворачиваться на $\pm 80^\circ$ и поворачиваться на $\pm 5^\circ$; Высота установки: 4 U (128 мм). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажное оборудование. Грузоподъемность: до 18 кг. Длина плеча: 348 мм.	
Держатель (рельса)	Держатель (рельса) может быть установлен на переднюю часть опорной стойки или на боковую часть вертикальных направляющих. Конструктивная высота: 1 U (32 мм). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 390x10x25. Масса: 1,0 кг $\pm$ 1%. Грузоподъемность: до 10 кг. Материал: нержавеющая сталь. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж.	
Держатель (рельса), 162 мм	Держатель (рельса) может быть установлен на переднюю часть опорной стойки или на боковую часть вертикальных направляющих. Конструктивная высота: 1 U (32 мм). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 162x10x25. Масса: 0,5 кг $\pm$ 1%. Грузоподъемность: до 10 кг. Материал: нержавеющая сталь. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж.	
Держатель (рельса), 390 мм	Держатель (рельса) может быть установлен на переднюю часть опорной стойки или на боковую часть вертикальных направляющих. Конструктивная высота: 1 U (32 мм). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 390x10x25. Масса: 1,0 кг $\pm$ 1%. Грузоподъемность: до 10 кг. Материал: нержавеющая сталь. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж.	

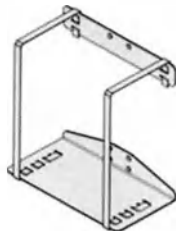
Держатель банки, вертикальное крепление в колонну	Мерный стакан объёмом 600 мл можно с лёгкостью разместить на вертикальных направляющих или на опорной стойке держателя. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 97х110х99. Масса: 0,9 кг ± 1%. Материал: мерный стакан: пластик, полипропилен, выдерживает до 135°C; подставка: сталь. Покрытие: мерный стакан: прозрачный, молочно-белый; подставка: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на внешней стороне вертикальных направляющих в т-образные пазы или на опорную стойку. Комплект поставки: 1 мерный стакан, подставка и крепёж.	
Держатель банки, крепление на держатель эндоскопа	Мерный стакан объёмом 600 мл можно прикрепить к телескопической стойке подставки для эндоскопа. Габаритные размеры, мм: 97х110х99. Масса: 0,9 кг ± 1% Материал: мерный стакан: пластик, полипропилен, выдерживает до 135°C; подставка: сталь. Покрытие: Мерный стакан: прозрачный, молочно-белый; подставка: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: с помощью зажима непосредственно на телескопическую стойку подставки для эндоскопа. Комплект поставки: 1 мерный стакан, подставка и крепёж.	
Держатель блока питания, 5U	Держатель предназначен для крепления блоков питания. Может быть закреплён как с задней стороны универсального держателя для монитора VESA 75 / 100, так и вертикально к опорной стойке. Максимальный обхват крепления: 250 мм Конструктивная высота: 5 U (160 мм) Масса: 0,2 кг ± 1%. Грузоподъёмность: до 3 кг Материал: сталь Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый Комплект поставки: 1 держатель для блока питания и крепёж	
Держатель блока питания, 7U	Держатель предназначен для крепления блоков питания. Может быть закреплён как с задней стороны универсального держателя для монитора VESA 75 / 100, так и вертикально к опорной стойке. Максимальный обхват крепления: 420 мм Конструктивная высота: 7 U (224 мм) Масса: 0,3 кг ± 1%. Грузоподъёмность: до 5 кг Материал: сталь Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый Комплект поставки: 1 держатель для блока питания и крепёж	

Держатель бутылки, 5 кг	Держатель устанавливается на полку. Подходит для ополаскивателей различных производителей. Грузоподъемность: 5 кг. Материал: нержавеющая сталь Установка: на полку Комплект поставки: 1 держатель для ополаскивателя и крепёж, в собранном виде.	
Держатель бутылки, 60 мм	Подставка предназначена для бутылок диаметром менее 60 мм. Материал: сталь. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на полку или ящик. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж, в собранном виде.	
Держатель газового баллона, 15 кг	Подставка для газовых баллонов может быть установлена на любой высоте с шагом 32 мм вдоль вертикальных направляющих или на опорной стойке. Диаметр баллона: макс. 100 мм; объем: макс. 2 л. Масса держателя: 0,8 кг ± 1% Грузоподъемность: 15 кг. Материал: сталь. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Комплект поставки: 1 подставка для газовых баллонов и крепёж, в собранном виде.	
Держатель газового баллона	Подставка для газовых баллонов может быть установлена на любой высоте с шагом 32 мм вдоль вертикальных направляющих или на опорной стойке. Диаметр баллона: макс. 145 мм; объем: макс. 3/5/10 л. Масса держателя: 0,9 кг ± 1% Грузоподъемность: 20 кг. Материал: сталь. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Комплект поставки: 1 подставка для газовых баллонов и крепёж, в собранном виде.	
Держатель газового баллона, 20 кг	Подставка для газовых баллонов может быть установлена на любой высоте с шагом 32 мм вдоль вертикальных направляющих или на опорной стойке. Диаметр баллона: макс. 175 мм; объем: 10 л / 20 л Масса держателя: 0,9 кг ± 1% Грузоподъемность: 20 кг. Материал: сталь. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Комплект поставки: 1 подставка для газовых баллонов и крепёж, в собранном виде.	

Держатель газового баллона, 50 кг	Подставка для газовых баллонов может быть установлена на любой высоте с шагом 32 мм вдоль вертикальных направляющих или на опорной стойке. Диаметр баллона: макс. 205 мм; объем: макс. 20 л. Масса держателя: 3,1 кг ± 1% Грузоподъемность: 50 кг. Материал: сталь. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Комплект поставки: 1 Подставка для газовых баллонов и крепёж, в собранном виде.	
Держатель двух мониторов с креплением на колонне, 0-14 кг	Двойной держатель монитора устанавливается непосредственно на центральную медиа-колонну и может вместить два монитора. Грузоподъемность: 2 x 14 кг. Каждый держатель монитора может быть наклонен на ±15° и повернут на ±170°. Масса: 3,0 кг ± 1%. Материал: Сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 двойной держатель монитора, включая монтажный материал.	
Держатель для аспирационной системы, 25,5 мм	Держателей применяются для профессиональных всасывающих систем. Материал: сталь Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж, подходящие для крепежа насадки при необходимости. Высота установки: 3 U (96 мм). Внутренний диаметр: 25,5 мм. Масса: 300 г ± 1%. Габаритные размеры: 150 x 50 мм.	
Держатель для аспирационной системы, 25 мм	Держателей применяются для профессиональных всасывающих систем. Материал: сталь Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж, подходящие для крепежа насадки при необходимости. Высота установки: 3 U (96 мм). Внутренний диаметр: 25,5 мм. Масса: 350 г ± 1%. Габаритные размеры: 150 x 51 мм.	
Держатель для аспирационной системы, 30 мм	Держателей применяются для профессиональных всасывающих систем. Материал: сталь Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж, подходящие для крепежа насадки при необходимости. Высота установки: 3 U (96 мм). Внутренний диаметр: 25,5 мм. Масса: 400 г ± 1%. Габаритные размеры: 150 x 60 мм.	

Держатель для сканера		Подставка для конусообразного сканера штрих-кодов шириной 6-8 см. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 243х97х88. Масса: 0,4 кг ± 1%. Грузоподъемность: 0.5 кг. Материал: пластик / сталь. Покрытие: антрацитовый серый / порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Комплект поставки: 1 держатель для сканера штрих-кодов и крепёж.	
Держатель емкости, 120 мм		Диаметр емкости: 120 мм Грузоподъемность: 5 кг Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 65х4х18 Масса: 26 г ± 1% Материал: сталь Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый Комплект поставки: 1 держатель и крепёж	
Держатель емкости, 145 мм		Диаметр: 145 мм Грузоподъемность: 5 кг Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 65х4х18. Масса: 26 г ± 1%. Материал: сталь; Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый; Комплект поставки: 1 держатель и крепёж.	
Держатель оборудования, 16 мм	16 мм	Диаметр креплений 16 мм Рабочий максимальный радиус (вращения) 900 мм Макс. Грузоподъемность 1 кг Материал: алюминий Покрытие: матовое хромированное, натуральное анодированное	
Держатель оборудования, 18 мм	18 мм	Диаметр креплений 18 мм Рабочий максимальный радиус (вращения) 890 мм Макс. Грузоподъемность 1 кг Материал: нержавеющая сталь / пластик Покрытие: отполированное	
Держатель кабеля, двойной		Держатель кабеля может быть установлен на опорной стойке. Вмещает до 5 м кабеля. Заводская сборка по требованию. Материал: пластик. Покрытие: RAL 7035 светло-серый. Комплект поставки: 2 держателя кабеля и крепёж. Габаритные размеры: (ШхВхГ): 2 x (60 x 60 x 37) мм. Масса: 0,6 кг ± 1%.	

Держатель кабеля, одиночный	Держатель кабеля используется для удобного и безопасного хранения оптоволокну и оптических кабелей. Ручка диаметром Ø 130 мм предотвращает спутывание. Материал: сталь / пластик. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый или белый. Комплект поставки: 1 держатель кабеля и крепёж. Масса: 0,6 кг ± 1%.	
Держатель камеры	Материал: чёрный пластик; Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 32x18x32 Масса: 0,01 кг ± 1% покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый; комплект поставки: 1 держатель камеры и крепёж.	
Держатель камеры с зажимом	Материал: крепление для камеры: чёрный пластик; зажим: сталь / алюминий; Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 32x18x32 Масса: 0,5 кг ± 1% покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый; комплект поставки: 1 держатель камеры и крепёж.	
Держатель клавиатуры, выдвижные	Особенности держатель клавиатуры: - могут вмещать клавиатуры различных размеров и обеспечивать эргономичное и удобное управление; - коврик для мыши выдвигается с обеих сторон; - поверхность с порошковым покрытием легко моется и устойчива к воздействию чистящих и дезинфицирующих средств. Размеры: глубина в закрытом положении: 383 мм / глубина в выдвинутом положении: 540 мм; длина: 450 мм; ширина подставки: 219 мм. Грузоподъемность: до 5 кг. Высота установки: 4 U (128 мм). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 держатель клавиатуры, включая монтажное оборудование.	
Держатель клавиатуры, раскладные	Особенности держатель клавиатуры: - могут вмещать клавиатуры различных размеров и обеспечивать эргономичное и удобное управление; - коврик для мыши выдвигается с обеих сторон; - поверхность с порошковым покрытием легко моется и устойчива к воздействию чистящих и дезинфицирующих средств. Грузоподъемность: до 5 кг (распределенная нагрузка) Высота установки: 4 U (128 мм). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 держатель клавиатуры, включая монтажное оборудование. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 448 x 302 мм.	

	Масса: 2,2 кг ± 1%.	
Держатель компьютера, 20 кг	Материал: сталь. Грузоподъемность: 20 кг. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 380х128х200 Масса: 2,8 кг ± 1%. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серое. Комплект поставки: 1 держатель для компьютера и крепёж, в собранном виде.	
Держатель компьютера, 5 кг	Материал: сталь. Грузоподъемность: 5 кг. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 240х128х40 Масса: 1 кг ± 1%. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серое. Комплект поставки: 1 держатель для компьютера и крепёж, в собранном виде.	
Держатель компьютерной мыши	Особенности держателя мыши: - комфортное размещение мыши; - сохраняет место, сохраняя мышь в безопасности; - прикрепляется клейкой лентой сзади. Материал: пластик. Отделка: светло-серый цвет RAL 7035. Комплект поставки: 1 держатель для мыши, включая ленту. Габаритные размеры, мм: 80х105х65. Масса: 25 г ± 1%.	
Держатель коннектора	Держатель позволяет безопасно разместить до трёх эндоскопов. Материал: пластик. Установка: на вертикальных направляющих. Комплект поставки: 1 держатель коннектора и крепёж. Габаритные размеры, см: 23 х 7,3 х 2,7 Масса: 0,45 кг	
Держатель монитора одноплечевой, 8-14 кг, 400 мм	Держатель используется для мониторов с адаптацией VESA 75/100. Наклон монитора (вверх или вниз) с низким усилием благодаря помощи пружинного механизма. Угол наклона держателя составляет ± 20°, угол поворота ± 90°. Так же его можно развернуть на ± 5°. Грузоподъёмность: 8 - 14 кг. Длина плеча: 400 мм. Высота установки: 5 U (160 мм). Материал: сталь / алюминий. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж.	
Держатель монитора двухплечевой 3-10 кг, 300 мм, 350 мм	Регулируемый по высоте держатель оснащён вместительными кабель-каналами, в которые помещаются нескольких кабелей. Регулируемые шарниры с функцией тормоза обеспечивают точное размещение монитора. Угол наклона монитора составляет ± 20°, угол поворота ± 90°. Так же его можно развернуть на ± 5°. Из-за подпружиненной опоры нужно приложить небольшое усилие, чтобы	

	наклонить монитор. Поворотный держатель устанавливается на подставку для монитора, которую нужно заказывать отдельно. Материал: сталь / алюминий. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на подставку для монитора. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж. Грузоподъемность: 3-10 кг. Длина плечей: 300 мм и 350 мм.	
Держатель монитора двухплечевой 3-10 кг, 400 мм, 350 мм	Регулируемый по высоте держатель оснащён вместительными кабель-каналами, в которые помещаются нескольких кабелей. Регулируемые шарниры с функцией тормоза обеспечивают точное размещение монитора. Угол наклона монитора составляет $\pm 20^\circ$, угол поворота $\pm 90^\circ$. Так же его можно развернуть на $\pm 5^\circ$. Из-за подпружиненной опоры нужно приложить небольшое усилие, чтобы наклонить монитор. Поворотный держатель устанавливается на подставку для монитора, которую нужно заказывать отдельно. Материал: сталь / алюминий. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на подставку для монитора. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж. Грузоподъемность: 3-10 кг. Длина плечей: 400 мм и 350 мм.	
Держатель монитора двухплечевой 8-14 кг, 300 мм, 350 мм	Регулируемый по высоте держатель оснащён вместительными кабель-каналами, в которые помещаются нескольких кабелей. Регулируемые шарниры с функцией тормоза обеспечивают точное размещение монитора. Угол наклона монитора составляет $\pm 20^\circ$, угол поворота $\pm 90^\circ$. Так же его можно развернуть на $\pm 5^\circ$. Из-за подпружиненной опоры нужно приложить небольшое усилие, чтобы наклонить монитор. Поворотный держатель устанавливается на подставку для монитора, которую нужно заказывать отдельно. Материал: сталь / алюминий. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на подставку для монитора. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж. Грузоподъемность: 8-14 кг. Длина плечей: 300 мм и 350 мм.	

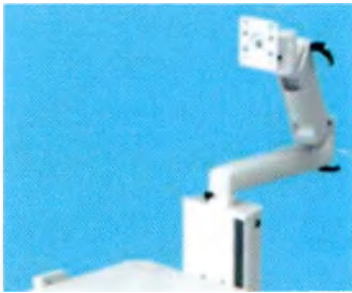
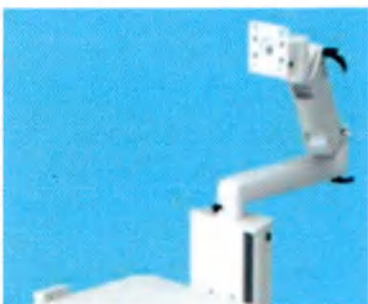
Держатель монитора двухплечевой 8-14 кг, 400 мм, 350 мм	Регулируемый по высоте держатель оснащён вместительными кабель-каналами, в которые помещаются нескольких кабелей. Регулируемые шарниры с функцией тормоза обеспечивают точное размещение монитора. Угол наклона монитора составляет $\pm 20^\circ$, угол поворота $\pm 90^\circ$. Так же его можно развернуть на $\pm 5^\circ$. Из-за подпружиненной опоры нужно приложить небольшое усилие, чтобы наклонить монитор. Поворотный держатель устанавливается на подставку для монитора, которую нужно заказывать отдельно. Материал: сталь / алюминий. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на подставку для монитора. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж. Грузоподъемность: 8-14 кг. Длина плечей: 400 мм и 350 мм.	
Держатель монитора двухплечевой, 0-14 кг, 250 мм, 250 мм	Держатель оснащён механизмом наклона и поворотным блоком, а также подходит для использования с VESA 75 / 100, что позволяет удобно разместить монитор. Внутренний кабель-канал вмещает несколько различных кабелей. Двойной держатель имеет более широкий рабочий диапазон. Угол наклона подпружиненного держателя монитора составляет $\pm 20^\circ$, угол поворота $\pm 90^\circ$. Так же его можно развернуть на $\pm 5^\circ$. Конструктивная высота: 3U (96 мм) Грузоподъёмность: до 14 кг. Материал: Сталь / алюминий. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на опорную стойку или с помощью Т-образных пазов, на вертикальных направляющих. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж. Длина плечей: 250 мм и 250 мм.	
Держатель монитора двухплечевой, 0-14 кг, 325 мм, 325 мм	Держатель оснащён механизмом наклона и поворотным блоком, а также подходит для использования с VESA 75 / 100, что позволяет удобно разместить монитор. Внутренний кабель-канал вмещает несколько различных кабелей. Двойной держатель имеет более широкий рабочий диапазон. Угол наклона подпружиненного держателя монитора составляет $\pm 20^\circ$, угол поворота $\pm 90^\circ$. Так же его можно развернуть на $\pm 5^\circ$. Конструктивная высота: 3U (96 мм) Грузоподъёмность: до 14 кг. Материал: Сталь / алюминий. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на опорную стойку или с помощью Т-образных пазов, на вертикальных направляющих. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж. Длина плечей: 325 мм и 325 мм.	

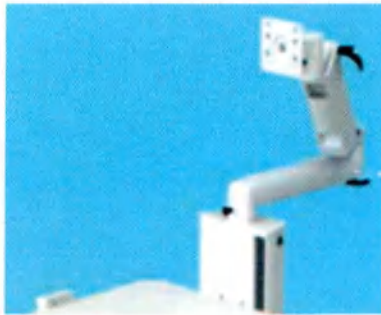
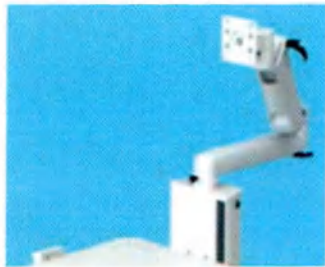
Держатель монитора двухплечевой, 14-18 кг, 348 мм, 348 мм	Особенности: - эргономичный рычаг управления обеспечивает непрерывную регулировку шарнирного соединения. - широкий спектр деятельности обеспечивает обширное рабочее пространство в соответствии с моделью. - кабельные каналы большого объема с рельефами натяжения позволяют размещать различные кабели. - для монтажа мониторов с адаптацией VESA 75/100. - может наклоняться на $\pm 20^\circ$, поворачиваться на $\pm 80^\circ$ и поворачиваться на $\pm 5^\circ$. Грузоподъемность: от 14 -18 кг. Высота установки: 4 U (128 мм). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажное оборудование. Длина плечей: 348 мм и 348 мм.	
Держатель монитора двухплечевой, 0-8 кг, 225 мм, 250 мм	Держатель используется для мониторов с адаптацией VESA 75/100. Может наклоняться на $+35^\circ$ / $- 20^\circ$ и поворачиваться на $\pm 90^\circ$. Грузоподъемность: до 8 кг. Длина плечей: (225 мм + 250 мм). Высота установки: 3 U (96 мм). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажное оборудование.	
Держатель монитора двухплечевой, 0-8 кг, 225 мм, 325 мм	Держатель используется для мониторов с адаптацией VESA 75/100. Может наклоняться на $+35^\circ$ / $- 20^\circ$ и поворачиваться на $\pm 90^\circ$. Грузоподъемность: до 8 кг. Длина плечей: (225 мм + 325 мм). Высота установки: 3 U (96 мм). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажное оборудование.	
Держатель монитора двухплечевой, 14-18 кг, 250 мм, 250 мм	Особенности держателя: - широкий спектр деятельности обеспечивает обширное рабочее пространство в соответствии с моделью; - кабельные каналы большого объема позволяют размещать различные кабели; - приемлемость мониторов с адаптацией VESA 75/100; - установка монитора (вверх или вниз) с одинаковым, низким усилием благодаря помощи пружинного усилия; - диапазон наклона $\pm 20^\circ$, диапазон поворота $\pm 90^\circ$. Грузоподъемность: до 18 кг. Высота установки: 3 U (96 мм). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажное оборудование.	

	Длина плечей: 250 мм и 250 мм.	
Держатель монитора двухплечевой, 14-18 кг, 325 мм, 325 мм	Особенности держателя: - широкий спектр деятельности обеспечивает обширное рабочее пространство в соответствии с моделью; - кабельные каналы большого объема позволяют размещать различные кабели; - приемлемость мониторов с адаптацией VESA 75/100; - установка монитора (вверх или вниз) с одинаковым, низким усилием благодаря помощи пружинного усилия; - диапазон наклона $\pm 20^\circ$, диапазон поворота $\pm 90^\circ$. Грузоподъемность: до 18 кг. Высота установки: 3 U (96 мм). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажное оборудование. Длина плечей: 325 мм и 325 мм.	
Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 250 мм	Держатель оснащён механизмом наклона и поворотным блоком, а также подходит для использования с VESA 75 / 100, что позволяет удобно разместить монитор. Внутренний кабель-канал с разгрузкой от натяжения вмещает несколько различных кабелей. Угол наклона подпружиненного держателя монитора составляет $\pm 20^\circ$, угол поворота $\pm 90^\circ$. Так же его можно развернуть на $\pm 5^\circ$. Конструктивная высота: 3U (96 мм) Грузоподъёмность: до 14 кг. Материал: сталь / алюминий. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на опорную стойку или с помощью Т-образных пазов, на вертикальных направляющих. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж. Длина плеча: 250 мм.	
Держатель монитора одноплечевой, 0-14 кг, 325 мм	Держатель оснащён механизмом наклона и поворотным блоком, а также подходит для использования с VESA 75 / 100, что позволяет удобно разместить монитор. Внутренний кабель-канал с разгрузкой от натяжения вмещает несколько различных кабелей. Угол наклона подпружиненного держателя монитора составляет $\pm 20^\circ$, угол поворота $\pm 90^\circ$. Так же его можно развернуть на $\pm 5^\circ$. Конструктивная высота: 3U (96 мм) Грузоподъёмность: до 14 кг. Материал: сталь / алюминий. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на опорную стойку или с помощью Т-образных пазов, на вертикальных направляющих. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж. Длина плеча: 325 мм.	

Держатель монитора одноплечевой, 0-8 кг, 225 мм	Держатель используется для мониторов с адаптацией VESA 75/100. Может наклоняться на $+35^{\circ}$ / -20° и поворачиваться на $\pm 90^{\circ}$. Грузоподъемность: до 8 кг. Длина плеча: 225 мм. Высота установки: 3 U (96 мм). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажное оборудование.	
Держатель монитора одноплечевой, 14- 18 кг, 348 мм	Особенности: - эргономичный рычаг управления обеспечивает непрерывную регулировку шарнирного соединения. - широкий спектр деятельности обеспечивает обширное рабочее пространство в соответствии с моделью. - кабельные каналы большого объема с рельефами натяжения позволяют размещать различные кабели. - для монтажа мониторов с адаптацией VESA 75/100. - может наклоняться на $\pm 20^{\circ}$, поворачиваться на $\pm 80^{\circ}$ и поворачиваться на $\pm 5^{\circ}$. Грузоподъемность: до 18 кг. Высота установки: 4 U (128 мм). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажное оборудование. Длина плеча: 348 мм.	
Держатель монитора одноплечевой, 14- 18 кг, 250 мм	Держатель оснащён механизмом наклона и поворотным блоком, а также подходит для использования с VESA 75 / 100, что позволяет удобно разместить монитор. Внутренний кабель-канал с разгрузкой от натяжения вмещает несколько различных кабелей. Угол наклона подпружиненного держателя монитора составляет $\pm 20^{\circ}$, угол поворота $\pm 90^{\circ}$. Так же его можно развернуть на $\pm 5^{\circ}$. Конструктивная высота: 3U (96 мм) Грузоподъемность: до 18 кг. Материал: сталь / алюминий. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на опорную стойку или с помощью Т-образных пазов, на вертикальных направляющих. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж. Длина плеча: 250 мм.	
Держатель монитора одноплечевой, 14- 18 кг, 325 мм	Держатель оснащён механизмом наклона и поворотным блоком, а также подходит для использования с VESA 75 / 100, что позволяет удобно разместить монитор. Внутренний кабель-канал с разгрузкой от натяжения вмещает несколько различных кабелей. Угол наклона подпружиненного держателя монитора составляет $\pm 20^{\circ}$, угол поворота $\pm 90^{\circ}$. Так же его можно развернуть на $\pm 5^{\circ}$. Конструктивная высота: 3U (96 мм) Грузоподъемность: до 18 кг.	

	Материал: сталь / алюминий. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на опорную стойку или с помощью Т-образных пазов, на вертикальных направляющих. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж. Длина плеча: 325 мм.	
Держатель монитора одноплечевой, 3-10 кг, 300 мм	Регулируемый по высоте держатель оснащён вместительными кабель-каналами, в которые помещаются нескольких кабелей. Регулируемые шарниры с функцией тормоза обеспечивают точное размещение монитора. Угол наклона монитора составляет $\pm 20^\circ$, угол поворота $\pm 90^\circ$. Так же его можно развернуть на $\pm 5^\circ$. Из-за подпружиненной опоры нужно приложить небольшое усилие, чтобы наклонить монитор. Конструктивная высота: 5 U (160 мм). Материал: сталь / алюминий. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на опорную стойку или с помощью Т-образных пазов на вертикальных направляющих. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж. Грузоподъёмность: до 10 кг. Длина плеча: 300 мм.	
Держатель монитора одноплечевой, 3-10 кг, 400 мм	Регулируемый по высоте держатель оснащён вместительными кабель-каналами, в которые помещаются нескольких кабелей. Регулируемые шарниры с функцией тормоза обеспечивают точное размещение монитора. Угол наклона монитора составляет $\pm 20^\circ$, угол поворота $\pm 90^\circ$. Так же его можно развернуть на $\pm 5^\circ$. Из-за подпружиненной опоры нужно приложить небольшое усилие, чтобы наклонить монитор. Конструктивная высота: 5 U (160 мм). Материал: сталь / алюминий. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на опорную стойку или с помощью Т-образных пазов на вертикальных направляющих. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж. Грузоподъёмность: до 10 кг. Длина плеча: 400 мм.	
Держатель монитора одноплечевой, 8-14 кг, 600 мм	Регулируемый по высоте держатель оснащён вместительными кабель-каналами, в которые помещаются нескольких кабелей. Регулируемые шарниры с функцией тормоза обеспечивают точное размещение монитора. Угол наклона монитора составляет $\pm 20^\circ$, угол поворота $\pm 90^\circ$. Так же его можно развернуть на $\pm 5^\circ$. Из-за подпружиненной опоры нужно приложить небольшое усилие, чтобы наклонить монитор. Конструктивная высота: 5 U (160 мм). Материал: сталь / алюминий. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый.	

		Установка: на опорную стойку или с помощью т-образных пазов на вертикальных направляющих. Комплект поставки: 1 держатель и крепёж. Грузоподъемность: до 14 кг. Длина плеча: 600 мм.	
Держатель монитора креплением колонне регулируемый, 0-14 кг	с в	Материал: сталь / алюминий / пластик. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Комплект поставки: 1 держатель для монитора, крепёж и декоративные накладки (по запросу). Грузоподъемность: до 14 кг. Наклон: $\pm 20^\circ$ Поворот: $\pm 180^\circ$ Габаритные размеры: 127 x 127 x 90 мм. Масса: 0,6 кг $\pm 1\%$.	
Держатель монитора креплением колонне универсальный, 0-14 кг	с в	Материал: сталь / алюминий / пластик. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Комплект поставки: 1 держатель для монитора, крепёж и декоративные накладки (по запросу). Грузоподъемность: до 14 кг. Габаритные размеры: 127 x 127 x 90 мм. Масса: 0,6 кг $\pm 1\%$.	
Держатель монитора креплением на колонне двухплечевой, 300 мм, 350 мм, 3-10 кг	с на	Регулируемый по высоте опорный рычаг в сочетании с поворотным рычагом обеспечивает больший радиус действия. Поворот плечей держателя: опорный рычаг: $\pm 110^\circ$, поворотный рычаг: $\pm 117^\circ$. Наклон держателя: $\pm 20^\circ$. Поворот держателя: $\pm 90^\circ$. Длина плечей держателя: 300 мм + 350 мм. Грузоподъемность: 3-10 кг. Материал: сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Установка: на центральную медиа-колонну. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажный материал.	
Держатель монитора креплением на колонне двухплечевой, 300 мм, 350 мм, 8-14 кг	с на	Регулируемый по высоте опорный рычаг в сочетании с поворотным рычагом обеспечивает больший радиус действия. Поворот плечей держателя: опорный рычаг: $\pm 110^\circ$, поворотный рычаг: $\pm 117^\circ$. Наклон держателя: $\pm 20^\circ$. Поворот держателя: $\pm 90^\circ$. Длина плечей держателя: 300 мм + 350 мм. Грузоподъемность: 8-14 кг. Материал: сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Установка: на центральную медиа-колонну. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажный материал.	

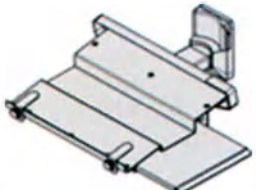
Держатель монитора с креплением на колонне двухплечевой, 400 мм, 350 мм, 3-10 кг	Регулируемый по высоте опорный рычаг в сочетании с поворотным рычагом обеспечивает больший радиус действия. Поворот плечей держателя: опорный рычаг: $\pm 110^\circ$, поворотный рычаг: $\pm 117^\circ$. Наклон держателя: $\pm 20^\circ$. Поворот держателя: $\pm 90^\circ$. Длина плечей держателя: 400 мм + 350 мм. Грузоподъемность: 3-10 кг. Материал: сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Установка: на центральную медиа-колонну. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажный материал.	
Держатель монитора с креплением на колонне двухплечевой, 400 мм, 350 мм, 8-14 кг	Регулируемый по высоте опорный рычаг в сочетании с поворотным рычагом обеспечивает больший радиус действия. Поворот плечей держателя: опорный рычаг: $\pm 110^\circ$, поворотный рычаг: $\pm 117^\circ$. Наклон держателя: $\pm 20^\circ$. Поворот держателя: $\pm 90^\circ$. Длина плечей держателя: 400 мм + 350 мм. Грузоподъемность: 8-14 кг. Материал: сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Установка: на центральную медиа-колонну. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажный материал.	
Держатель монитора с креплением на колонне одноплечевой, 300 мм, 3-10 кг	Поворот плеча держателя: $\pm 110^\circ$. Наклон держателя: $\pm 20^\circ$. Поворот держателя: $\pm 90^\circ$. Длина плеча держателя: 300 мм. Грузоподъемность: 3-10 кг. Материал: сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Установка: на центральную медиа-колонну. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажный материал.	
Держатель монитора с креплением на колонне одноплечевой, 300 мм, 8-14 кг	Поворот плеча держателя: $\pm 110^\circ$. Наклон держателя: $\pm 20^\circ$. Поворот держателя: $\pm 90^\circ$. Длина плеча держателя: 300 мм. Грузоподъемность: 8-14 кг. Материал: сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Установка: на центральную медиа-колонну. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажный материал.	

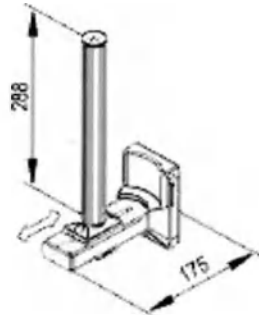
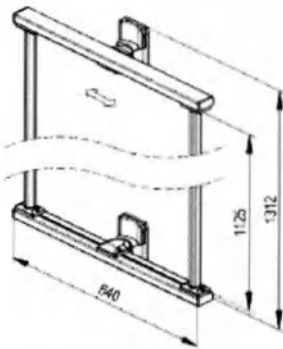
Держатель монитора креплением колонне одноплечевой, 400 мм, 3-10 кг	с на	Поворот плеча держателя: $\pm 110^\circ$. Наклон держателя: $\pm 20^\circ$. Поворот держателя: $\pm 90^\circ$. Длина плеча держателя: 400 мм. Грузоподъемность: 3-10 кг. Материал: сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Установка: на центральную медиа-колонну. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажный материал.	
Держатель монитора креплением колонне одноплечевой, 400 мм, 8-14 кг	с на	Поворот плеча держателя: $\pm 110^\circ$. Наклон держателя: $\pm 20^\circ$. Поворот держателя: $\pm 90^\circ$. Длина плеча держателя: 400 мм. Грузоподъемность: 8-14 кг. Материал: сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Установка: на центральную медиа-колонну. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажный материал.	
Держатель монитора креплением колонне, 0-14 кг	с на	Держатель используется для мониторов с адаптацией VESA 75/100. Держатель устанавливается непосредственно на центральную медиа-колонну. Диапазон наклона $\pm 15^\circ$. Диапазон поворота 170° . Грузоподъемность: до 14 кг. Габаритные размеры: 240 x 80 x 90 мм. Масса: 1,8 кг $\pm 1\%$. Материал: Сталь/алюминий. Отделка: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 держатель монитора, включая монтажное оборудование.	
Держатель монитора креплением колонне регулируемый, 0-14 кг	с на	Держатель монитора используется для мониторов с адаптацией VESA 75/100. Диапазон наклона: $\pm 20^\circ$. Диапазон поворота: $\pm 180^\circ$. Грузоподъемность: до 14 кг. Габаритные размеры: 240 x 80 x 90 мм. Масса: 1,5 кг $\pm 1\%$. Материал: сталь / алюминий / пластик. Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Установка: на опорной колонне. Комплект поставки: 1 держатель монитора, включая монтажное оборудование.	
Держатель монитора креплением колонне универсальный, 0-14 кг	с на	Держатель монитора используется для мониторов с адаптацией VESA 75/100. Грузоподъемность: до 14 кг. Габаритные размеры: 240 x 80 x 90 мм. Масса: 1,5 кг $\pm 1\%$. Материал: сталь / алюминий / пластик. Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Установка: на опорной колонне. Комплект поставки: 1 держатель монитора, включая монтажное оборудование.	

Держатель монитора с полкой для клавиатуры	Этот держатель для монитора с адаптером для VESA 75 / 100 и подставкой для клавиатуры разработан специально для использования с базовой стойкой с педалью регулирования высоты vexio-cart. Под подставкой для клавиатуры расположена подставка для мыши, которая выдвигается вправо или влево. Крепление для монитора можно наклонить на $\pm 20^\circ$. Грузоподъемность: кронштейн: 14 кг; подставка для клавиатуры: 5 кг распределённого веса. Материал: сталь/алюминий. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Комплект поставки: 1 держатель для монитора с адаптером для VESA 75 / 100 и подставкой для клавиатуры, фабричная сборка. Габаритные размеры: 430 x 450 x 490 мм. Масса: 2,0 кг $\pm 1\%$.	
Держатель монитора с регулировкой высоты	Этот держатель для монитора с адаптером для VESA 75 / 100 и ручками разработан специально для использования с базовой стойкой с педалью регулирования высоты vexio-cart. На ручки из литого алюминия нанесено порошковое покрытие. Ручки используются для облегчения позиционирования стойки во время операции. Крепление для монитора можно наклонить на $\pm 20^\circ$. Грузоподъемность: до 14 кг. Материал: сталь. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Комплект поставки: 1 держатель для монитора с адаптером для VESA 100 / 200 / 300 и ручками, только фабричная сборка. Габаритные размеры: 330 x 350 x 190 мм. Масса: 3,0 кг $\pm 1\%$.	
Держатель монитора универсальным адаптером	Особенности: - возможность поворота до 90°. - для монтажа и крепления медицинского оборудования к стандартной направляющей (вертикальной / горизонтальной) и столбу ($\varnothing 25-42$ мм). - подсоединяется к анкеру коротким опорным рычагом (длина 48 мм). - с универсальным адаптером. - может наклоняться на $\pm 15^\circ$ (индивидуально регулируется весом монитора) и поворачиваться на $\pm 80^\circ$. Грузоподъемность: до 5 кг. Комплект поставки: 1 держатель монитора, включая монтажное оборудование. Габаритные размеры: 222 x 124 x 170 мм. Масса: 1,5 кг $\pm 1\%$.	

Держатель монитора фронтальным креплением колонне универсальный, 0-14 кг	с на 0- Держатель монитора используется для мониторов с адаптацией VESA 75/100. Диапазон наклона $\pm 15^\circ$. Диапазон поворота $\pm 25^\circ$. Грузоподъемность: до 14 кг. Габаритные размеры: 240 x 80 x 90 мм. Масса: 1,8 кг $\pm 1\%$. Высота установки: 4 U (128 мм). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 держатель монитора, включая монтажное оборудование.	
Держатель монитора фронтальным креплением колонне, 0-14 кг	с на Особенности держателя монитора: - используется для мониторов с адаптацией VESA 75/100. - установка монитора (вверх или вниз) с одинаковым, низким усилием благодаря помощи пружинного усилия. - может наклоняться на $\pm 20^\circ$, поворачиваться на $\pm 20^\circ$. Высота установки: 3 U (96 мм). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 держатель монитора, включая монтажное оборудование. Грузоподъемность: до 14 кг. Габаритные размеры: 150 x 150 x 170 мм. Масса: 1,3 кг $\pm 1\%$.	
Держатель монитора фронтальным креплением колонне, 14-18 кг	с на Особенности держателя монитора: - используется для мониторов с адаптацией VESA 75/100. - установка монитора (вверх или вниз) с одинаковым, низким усилием благодаря помощи пружинного усилия. - может наклоняться на $\pm 20^\circ$, поворачиваться на $\pm 20^\circ$. Высота установки: 3 U (96 мм). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 держатель монитора, включая монтажное оборудование. Грузоподъемность: до 18 кг. Габаритные размеры: 155 x 155 x 170 мм. Масса: 1,4 кг $\pm 1\%$.	

Держатель монитора, вращающийся	Особенности: - возможность поворота до 90°. - для монтажа и крепления медицинского оборудования к стандартной направляющей (вертикальной / горизонтальной) и столбу (Ø 25-42 мм). - подсоединяется к анкеру коротким опорным рычагом (длина 48 мм). - с адаптацией VESA 75/100. - может наклоняться на $\pm 15^\circ$ (индивидуально регулируется весом монитора) и поворачиваться на $\pm 80^\circ$. Грузоподъемность: до 5 кг. Комплект поставки: 1 держатель монитора, включая монтажное оборудование. Габаритные размеры: 222 x 128 x 180 мм. Масса: 1,6 кг $\pm$ 1%.	
Держатель монитора, регулируемый	Держатель для мониторов с адаптером VESA 75/100. Установка: крепится к просверленной рабочей поверхности или полке с помощью прилагаемых винтов и встречной пластины. Диапазон наклона держателя монитора $\pm 15^\circ$ (индивидуально регулируется в зависимости от веса монитора) и диапазон поворота $\pm 160^\circ$. Грузоподъемность: до 14 кг. Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Габаритные размеры: 240 x 80 x 90 мм $\pm$ 10 %. Масса: 1,8 кг $\pm$ 1%.	
Держатель монитора, универсальный	Держатель для мониторов с адаптером VESA 75/100. Установка: крепится к просверленной рабочей поверхности или полке с помощью прилагаемых винтов и встречной пластины. Диапазон наклона держателя монитора $\pm 15^\circ$ (индивидуально регулируется в зависимости от веса монитора) и диапазон поворота $\pm 160^\circ$. Грузоподъемность: до 14 кг. Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Габаритные размеры: 240 x 70 x 60 мм. Масса: 1,8 кг $\pm$ 1%.	
Держатель на 1 с эндоскоп, вертикальной установкой	Держатель подходит для размещения всех стандартных моделей эндоскопов без перекручивания. Стойка регулируется по высоте, что позволяет разместить эндоскоп длиной до 2 м. Само крепление подставки регулируется, что позволяет безопасно закрепить эндоскоп. Материал: подставка: полипропилен; крепление: полипропилен повышенной прочности; телескопическая стойка: хромированная сталь. Комплект поставки: 1 держатель для эндоскопа и крепёж. Габаритные размеры: 75 x 1692 x 155 мм. Масса: 1,5 кг $\pm$ 1%.	

Держатель на 1 эндоскоп, креплением на рельсы	Держатель подходит для размещения всех стандартных моделей эндоскопов без перекручивания. Стойка регулируется по высоте, что позволяет разместить эндоскоп длиной до 2 м. Само крепление подставки регулируется, что позволяет безопасно закрепить эндоскоп. Материал: подставка: полипропилен; крепление: полипропилен повышенной прочности; телескопическая стойка: хромированная сталь. Комплект поставки: 1 держатель для эндоскопа и крепёж. Габаритные размеры: 75 x 1692 x 155 мм. Масса: 2,1 кг ± 1%.	
Держатель на 2 эндоскопа, вертикальной установкой	Держатель подходит для размещения всех стандартных моделей эндоскопов без перекручивания. Стойка регулируется по высоте, что позволяет разместить эндоскоп длиной до 2 м. Само крепление подставки регулируется, что позволяет безопасно закрепить эндоскоп. Материал: подставка: полипропилен; крепление: полипропилен повышенной прочности; телескопическая стойка: хромированная сталь. Комплект поставки: 1 держатель для эндоскопа и крепёж. Габаритные размеры: 130 x 1770 x 401 мм. Масса: 2,5 кг ± 1%.	
Держатель на 2 эндоскопа, креплением на рельсы	Держатель подходит для размещения всех стандартных моделей эндоскопов без перекручивания. Стойка регулируется по высоте, что позволяет разместить эндоскоп длиной до 2 м. Само крепление подставки регулируется, что позволяет безопасно закрепить эндоскоп. Материал: подставка: полипропилен; крепление: полипропилен повышенной прочности; телескопическая стойка: хромированная сталь. Комплект поставки: 1 держатель для эндоскопа и крепёж. Габаритные размеры: 130 x 1770 x 401 мм. Масса: 3,1 кг ± 1%.	
Держатель ноутбука с держателем мыши	Держатель ноутбука размещается непосредственно на опорной стойке. Ноутбук закрепляется текстильной застёжкой длиной в 935 мм (±5%) и двумя регулируемыми креплениями. Встроенную подставку для мыши можно разместить справа или слева на расстоянии до 230 мм (±5%). Габаритные размеры (ШxВxГ), мм: 336x127x397. Масса: 3,4 кг ± 1%. Грузоподъёмность: до 10 кг распределённого веса.	

	Материал: подставка для ноутбука: алюминий / сталь; текстильная застёжка: пластик. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Комплект поставки: 1 держатель ноутбука и крепёж, в собранном виде.	
Держатель отсоса	Особенности: - используется для размещения инфузионных систем на столбе (Ø 28 мм) - система крепления с использованием пружинных гаек и Т-образных пазов позволяет адаптировать соответствующее положение к типу насоса. Грузоподъемность: до 35 кг. Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие, опорная стойка: алюминий, натуральный анодированный. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажное оборудование. Габаритные размеры: 288x175x80 мм. Масса: 1,0 кг ± 1%.	
Держатель отсоса, двойной	Особенности: - используется для крепления инфузионных и нагнетательных насосов на двух полюсах (Ø 28 мм). Грузоподъемность: до 35 кг. Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие, опорная стойка: алюминий, натуральный анодированный. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажное оборудование. Габаритные размеры: 640x1312x50 мм. Масса: 5,6 кг ± 1%.	
Держатель педали	Подставка для педали устанавливается на вертикальных направляющих или на опорной стойке и обеспечивает компактное размещение педали. Материал: сталь. Габаритные размеры: 82x89x50 мм. Масса: 0,1 кг ± 1%. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Комплект поставки: 1 держатель для педали и крепёж.	
Держатель шланга	Держатель подходит для всех шлангов от 6 мм до 14 мм, например, для шланга всасывающей системы. Материал: нержавеющая сталь. Габаритные размеры: 70x24x41. Масса: 0,1 кг ± 1%. Комплект поставки: 1 держатель для шланга и крепёж, в собранном виде.	

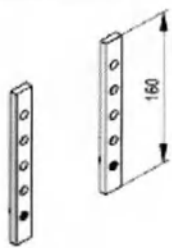
Держатель, 10U	Держатель вмещает различные опорные кронштейны и держатели мониторов. Установка: монтируется на просверленную столешницу или полку с помощью винтов и прилагаемой столешницы. Грузоподъемность: до 30 кг. Высота установки: 10 U (320 мм). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 держатель с резьбовыми планками, 1 крышка и накладка, включая монтажное оборудование.	
Держатель, фиксированный	Держатель используется для монтажа и крепления медицинского оборудования к стандартному бегуну и столбу. Модель: держатель, жесткий, для размещения на стандартной направляющей. Материал: держатель: алюминий, переходная пластина (блок вращения): листовая сталь. Грузоподъемность: 5 кг. Отделка: держатель: анодированный, переходная пластина: RAL7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 держатель, включая монтажное оборудование. Габаритные размеры: 191 x 64 x 58 мм.	
Защитная крышка для кабеля, 2 м	Особенности: - обеспечивает защиту и гигиену отходящих кабелей; - надежная система закрытия позволяет быстро очищать или добавлять кабели. Материал: ПВХ. Длина: 2 м. Диаметр: 25 мм. Масса: 200 г ± 1%. Комплект поставки: 1 защитный чехол с системой закрывания.	
Защитная крышка для кабеля, 3 м	Особенности: - обеспечивает защиту и гигиену отходящих кабелей; - надежная система закрытия позволяет быстро очищать или добавлять кабели. Материал: ПВХ. Длина: 3 м. Диаметр: 25 мм. Масса: 300 г ± 1%. Комплект поставки: 1 защитный чехол с системой закрывания.	
Защитный комплект для колес, 100 мм	Во избежание повреждения кабеля рекомендуется использовать защитные ограждения на колесах. Этот продукт гарантирует, что кабели, лежащие на земле, не будут пережжены стойкой с оборудованием. Материал: Пластик LDPE. Поверхность: RAL 7015 шиферно-серый. Комплект поставки: 4 ограждения для кабелей, включая монтажный материал. Защитные ограждения рассчитаны на колеса диаметром 100 мм. Масса комплекта: 200 г ± 1%.	

Защитный комплект для колес, 125 мм	Во избежание повреждения кабеля рекомендуется использовать защитные ограждения на колесах. Этот продукт гарантирует, что кабели, лежащие на земле, не будут пережжены стойкой с оборудованием. Материал: Пластик LDPE. Поверхность: RAL 7015 шиферно-серый. Комплект поставки: 4 ограждения для кабелей, включая монтажный материал. Защитные ограждения рассчитаны на колеса диаметром 125 мм. Масса комплекта: 250 г ± 1%.	
Кабель - разветвители, 3 выхода	3-ходовой кабельный жгут. 3 кабеля разной длины могут быть подведены через кабельный канал на разной высоте. Подключение к источнику питания осуществляется снизу основания. Длина: 5 м. Масса: 0,7 кг ± 1%. Материал: сталь / пластик / медь. Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 кабельный жгут 3-сторонний, 1 точка передачи, включая монтажное оборудование; кабель предварительно установлен на стойку.	
Кабель Schuko	EURO розетка: IEC 320. Длина: 5 м. Вилка: CEE7 / VII. Номинальный ток/напряжение: 10 А / 250 В (перем. ток). Комплект поставки: 1 соединительный кабель.	
Кабель Schuko с POAG	EURO розетка: IEC 320. Длина: 5 м. Вилка: CEE7 / VII. Номинальный ток/напряжение: 10 А / 250 В (перем. ток). Комплект поставки: 1 соединительный кабель.	
Кабель-канал с заземлением, 0,3 м	Особенности кабеля: - используется для подключения установленных блоков с помощью эквипотенциального штекера. - очень гибкий кабель с зелено-желтой изоляцией из ПВХ; снабжен наклонным эквипотенциальным разъемом KBT6 DIN с обеих сторон. Материал: эквипотенциальное гнездо: никелированная латунь, кабель: медь. Комплект поставки: 1 кабель с наклонным разъемом с обеих сторон. Длина: 0,3 м. Площадь поперечного сечения: 6 мм² ± 1%. Масса: 100 г ± 1%.	
Кабель-канал с заземлением, 0,5 м	Особенности кабеля: - используется для подключения установленных блоков с помощью эквипотенциального штекера. - очень гибкий кабель с зелено-желтой изоляцией из ПВХ; снабжен наклонным	

	эквипотенциальным разъемом KBT6 DIN с обеих сторон. Материал: эквипотенциальное гнездо: никелированная латунь, кабель: медь. Комплект поставки: 1 кабель с наклонным разъемом с обеих сторон. Длина: 0,5 м. Площадь поперечного сечения: $6 \text{ мм}^2 \pm 1\%$. Масса: $200 \text{ г} \pm 1\%$.	
Кабель-канал с заземлением, 1,0 м	Особенности кабеля: - используется для подключения установленных блоков с помощью эквипотенциального штекера. - очень гибкий кабель с зелено-желтой изоляцией из ПВХ; снабжен наклонным эквипотенциальным разъемом KBT6 DIN с обеих сторон. Материал: эквипотенциальное гнездо: никелированная латунь, кабель: медь. Комплект поставки: 1 кабель с наклонным разъемом с обеих сторон. Длина: 1,0 м. Площадь поперечного сечения: $6 \text{ мм}^2 \pm 1\%$. Масса: $300 \text{ г} \pm 1\%$.	
Кабель-канал с заземлением, 1,5 м	Особенности кабеля: - используется для подключения установленных блоков с помощью эквипотенциального штекера. - очень гибкий кабель с зелено-желтой изоляцией из ПВХ; снабжен наклонным эквипотенциальным разъемом KBT6 DIN с обеих сторон. Материал: эквипотенциальное гнездо: никелированная латунь, кабель: медь. Комплект поставки: 1 кабель с наклонным разъемом с обеих сторон. Длина: 1,5 м. Площадь поперечного сечения: $6 \text{ мм}^2 \pm 1\%$. Масса: $400 \text{ г} \pm 1\%$.	
Кабель-канал с заземлением, 5 м	Особенности кабеля: - используется для подключения установленных блоков с помощью эквипотенциального штекера. - очень гибкий кабель с зелено-желтой изоляцией из ПВХ; снабжен наклонным эквипотенциальным разъемом KBT6 DIN с обеих сторон. Материал: эквипотенциальное гнездо: никелированная латунь, кабель: медь. Комплект поставки: 1 кабель с наклонным разъемом с обеих сторон. Длина: 5 м. Площадь поперечного сечения: $6 \text{ мм}^2 \pm 1\%$. Масса: $1400 \text{ г} \pm 1\%$.	
Кабель-канал, 21U	Кабель-каналы расположены по бокам опорной стойки, что позволяет разместить кабель питания и кабели передачи данных в разные кабель-каналы. Кабель-каналы шарнирно соединены с обеих сторон, что обеспечивает лёгкий доступ к кабелям при обслуживании. Материал: алюминий.	

	Комплект поставки: 2 кабель-канала с резьбой и крепёж. Высота установки: 21 U (672 мм).	
Кабель-канал, 23U	Кабель-каналы расположены по бокам опорной стойки, что позволяет разместить кабель питания и кабели передачи данных в разные кабель-каналы. Кабель-каналы шарнирно соединены с обеих сторон, что обеспечивает лёгкий доступ к кабелям при обслуживании. Материал: алюминий. Комплект поставки: 2 кабель-канала с резьбой и крепёж. Высота установки: 23 U (736 мм).	
Кабель-канал, 25U	Кабель-каналы расположены по бокам опорной стойки, что позволяет разместить кабель питания и кабели передачи данных в разные кабель-каналы. Кабель-каналы шарнирно соединены с обеих сторон, что обеспечивает лёгкий доступ к кабелям при обслуживании. Материал: алюминий. Комплект поставки: 2 кабель-канала с резьбой и крепёж. Высота установки: 25 U (800 мм).	
Кабель-канал, 30U	Кабель-каналы расположены по бокам опорной стойки, что позволяет разместить кабель питания и кабели передачи данных в разные кабель-каналы. Кабель-каналы шарнирно соединены с обеих сторон, что обеспечивает лёгкий доступ к кабелям при обслуживании. Материал: алюминий. Комплект поставки: 2 кабель-канала с резьбой и крепёж. Высота установки: 30 U (960 мм).	
Кабель-канал, 35U	Кабель-каналы расположены по бокам опорной стойки, что позволяет разместить кабель питания и кабели передачи данных в разные кабель-каналы. Кабель-каналы шарнирно соединены с обеих сторон, что обеспечивает лёгкий доступ к кабелям при обслуживании. Материал: алюминий. Комплект поставки: 2 кабель-канала с резьбой и крепёж. Высота установки: 35 U (1120 мм).	
Кабель-канал, T-slots 21U	Кабель-каналы можно закрепить по бокам опорной стойки с помощью Т-образных пазов (без использования инструментов), разделив кабель питания и кабель передачи данных по разным сторонам опорной стойки. Материал: пластик PVC-U and PVC-C. Покрытие: RAL 7035 светло-серый. Комплект поставки: 2 кабель-канала. Высота установки: 21 U (672 мм).	
Кабель-канал, T-slots 23U	Кабель-каналы можно закрепить по бокам опорной стойки с помощью Т-образных пазов (без использования инструментов), разделив кабель питания и кабель передачи данных по разным сторонам опорной стойки. Материал: пластик PVC-U and PVC-C. Покрытие: RAL 7035 светло-серый. Комплект поставки: 2 кабель-канала. Высота установки: 23 U (736 мм).	

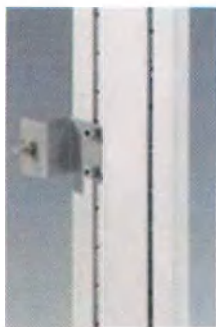
Кабель-канал, slots 25U	T-	Кабель-каналы можно закрепить по бокам опорной стойки с помощью T-образных пазов (без использования инструментов), разделив кабель питания и кабель передачи данных по разным сторонам опорной стойки. Материал: пластик PVC-U and PVC-C. Покрытие: RAL 7035 светло-серый. Комплект поставки: 2 кабель-канала. Высота установки: 25 U (800 мм).	
Кабель-канал, slots 30U	T-	Кабель-каналы можно закрепить по бокам опорной стойки с помощью T-образных пазов (без использования инструментов), разделив кабель питания и кабель передачи данных по разным сторонам опорной стойки. Материал: пластик PVC-U and PVC-C. Покрытие: RAL 7035 светло-серый. Комплект поставки: 2 кабель-канала. Высота установки: 30 U (960 мм).	
Кабель-канал, slots 35U	T-	Кабель-каналы можно закрепить по бокам опорной стойки с помощью T-образных пазов (без использования инструментов), разделив кабель питания и кабель передачи данных по разным сторонам опорной стойки. Материал: пластик PVC-U and PVC-C. Покрытие: RAL 7035 светло-серый. Комплект поставки: 2 кабель-канала. Высота установки: 35 U (1120 мм).	
Клемма для монтажа аксессуаров на бегунках, 16 мм	для на	Клеммы используются для крепления аксессуаров с диаметром отверстия Ø 16 мм. Материал: алюминий. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на стандартный бегунок. Комплект поставки: 1 клемма.	
Клемма для монтажа аксессуаров на бегунках, 18 мм	для на	Клеммы используются для крепления аксессуаров с диаметром отверстия Ø 18 мм. Материал: алюминий. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на стандартный бегунок. Комплект поставки: 1 клемма.	
Клемма для монтажа аксессуаров на полках, 16 мм		Клеммы используются для крепления аксессуаров с диаметром отверстия Ø 16 мм. Материал: алюминий. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на полки. Комплект поставки: 1 клемма.	
Клемма для монтажа аксессуаров на полках, 18 мм		Клеммы используются для крепления аксессуаров с диаметром отверстия Ø 18 мм. Материал: алюминий. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на полки. Комплект поставки: 1 клемма.	

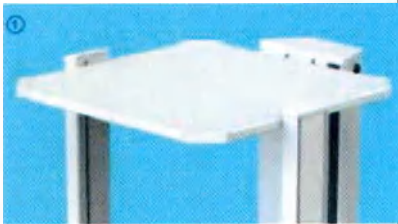
Корзина на держатель (рельса)	Грузоподъемность: 3 кг Материал: стальная проволока. Покрытие: Порошковое покрытие RAL9016 белый. Габариты: 310 мм x 205 мм x 160 мм. Комплект поставки: 1 корзина, включая монтажное оборудование.	
Корзина пластиковая	Грузоподъемность: 3 кг Материал: пластик / сталь Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый/белый. Габариты: 305 мм x 180 мм x 100 мм. Комплект поставки: 1 пластиковая корзина и крепёж	
Корзина с креплением на колонну	Конусообразная корзина для хранения. Габариты: 310 мм x 205 мм x 160 мм. Грузоподъемность: 3 кг. Материал: сталь. Покрытие: RAL 9016 белый, псевдооживленное покрытие. Комплект поставки: 1 корзина и крепёж.	
Корзина, маленькая	Малая конусообразная корзина для хранения. Габариты: 205 мм x 93 мм x 150 мм. Грузоподъемность: 3 кг. Материал: сталь. Покрытие: RAL 7035 светло-серый. Комплект поставки: 1 корзина и крепёж.	
Крепление для аксессуаров	Рельсовые крепления используются для размещения аксессуаров на полках или на стандартных бегунках. Используется в паре с различным креплением для размещения стоек для инфузии и держателей для эндоскопа на двух полках. Материал: алюминий. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на стандартный бегунок или на полку. Комплект поставки: 1 крепление. Габаритные размеры, см: 4,7 x 3,7 x 6,8 Масса: 0,2 кг	
Монтажные наборы для крепления держателей мониторов	Особенности набора: - для установки различных опорных кронштейнов с адаптерной пластиной ITD на стойки. Отделка: Оцинкованная. Комплект поставки: 2 резьбовые планки, включая монтажное оборудование. Габаритные размеры: 160 x 12 x 5 мм. Масса: 100 г ± 1%.	

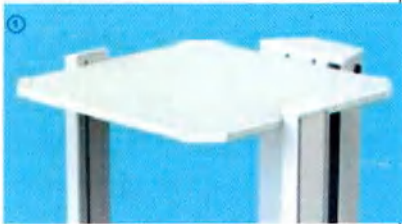
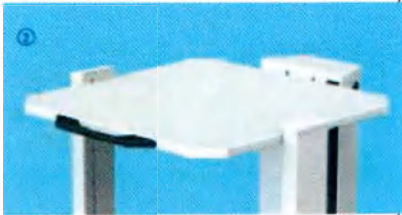
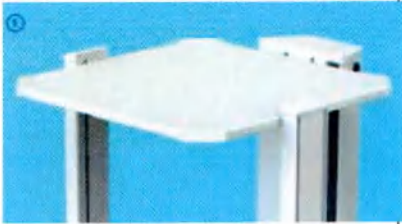
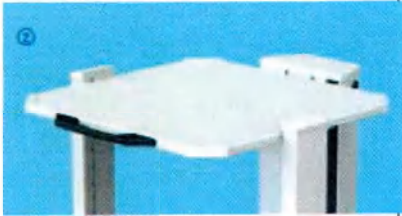
Набор кабелей Economy, POAG	Кабели POAG с разъёмами закрепляются на требуемой высоте к боковым резьбовым полосам. В версии «Economy» розетки находятся под основанием опорной стойки. Материал: сталь / пластик / медь. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Размещение: под основанием опорной стойки. Комплект поставки: 1 набор розеток POAG, стандартный крепёж и дополнительное оборудование для крепления, в собранном виде. Длина: 60 см. Масса: 400 г ± 1%.	
Набор кабелей Profi, POAG	Кабели POAG с разъёмами закрепляются на требуемой высоте к боковым резьбовым полосам. В версии «Profi» розетки расположены в электрошкафу. Материал: сталь / пластик / медь. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Размещение: под основанием опорной стойки. Комплект поставки: 1 набор розеток POAG, стандартный крепёж и дополнительное оборудование для крепления, в собранном виде. Длина: 60 см. Масса: 400 г ± 1%.	
Набор колес 100 мм	Комплект поставки: 4 колёсика с блокираторами. Диаметр колес: 100 мм.	
Набор колес 125 мм	Комплект поставки: 4 колёсика с блокираторами. Диаметр колес: 125 мм.	
Набор колес 125 мм, электропроводные	Комплект поставки: 4 колёсика электропроводные с блокираторами. Диаметр колес: 125 мм.	
Набор колес, 100 мм, электропроводные	Комплект поставки: 4 колёсика электропроводные с блокираторами. Диаметр колес: 100 мм.	
Набор ящиков	Особенности: полностью выдвижные телескопические рельсы с блокираторами не дают ящикам самопроизвольно выкатываться вперёд. Полностью выдвижные телескопические рельсы максимизируют пространство для хранения внутри ящика и упрощают уборку. Габаритные размеры: 424 x 430 x 90 мм. Полезная площадь: 400 мм x 384 мм. Грузоподъёмность: полка: 10 кг распределённого веса, ящик: 3 кг распределённого веса. Материал: сталь / алюминий / пластик. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Размещение: с помощью Т-образных пазов на передней части опорной стойки. Комплект поставки: 1 набор ящиков и крепёж, в собранном виде.	

Набор ящиков с двумя отделениями	Особенности: полностью выдвижные телескопические рельсы с блокираторами не дают ящикам самопроизвольно выкатываться вперёд. Полностью выдвижные телескопические рельсы максимизируют пространство для хранения внутри ящика и упрощают уборку. Габаритные размеры: 424 x 430 x 180 мм. Полезная площадь: 400 мм x 384 мм. Грузоподъёмность: полка: 10 кг распределённого веса, ящик: 3 кг распределённого веса. Материал: сталь / алюминий / пластик. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Размещение: с помощью Т-образных пазов на передней части опорной стойки. Комплект поставки: 1 набор ящиков и крепёж, в собранном виде.	
Набор ящиков с двумя отделениями и ручкой сбоку	Особенности: полностью выдвижные телескопические рельсы с блокираторами не дают ящикам самопроизвольно выкатываться вперёд. Полностью выдвижные телескопические рельсы максимизируют пространство для хранения внутри ящика и упрощают уборку. Габаритные размеры: 424 x 430 x 180 мм. Полезная площадь: 400 мм x 384 мм. Грузоподъёмность: полка: 10 кг распределённого веса, ящик: 3 кг распределённого веса. Материал: сталь / алюминий / пластик. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Размещение: с помощью Т-образных пазов на передней части опорной стойки. Комплект поставки: 1 набор ящиков и крепёж, в собранном виде.	
Набор ящиков с замком	Особенности: полностью выдвижные телескопические рельсы с блокираторами не дают ящикам самопроизвольно выкатываться вперёд. Полностью выдвижные телескопические рельсы максимизируют пространство для хранения внутри ящика и упрощают уборку. Габаритные размеры: 424 x 430 x 90 мм. Полезная площадь: 400 мм x 384 мм. Грузоподъёмность: полка: 10 кг распределённого веса, ящик: 3 кг распределённого веса. Материал: сталь / алюминий / пластик. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Размещение: с помощью Т-образных пазов на передней части опорной стойки. Комплект поставки: 1 набор ящиков и крепёж, в собранном виде.	

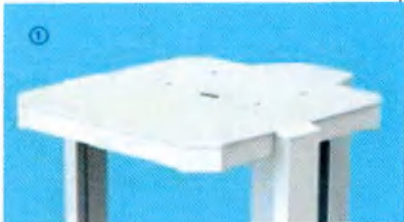
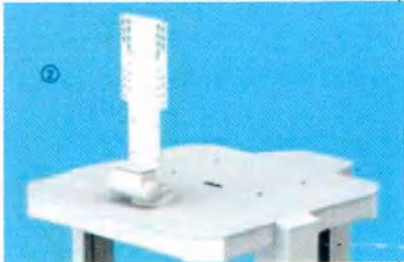
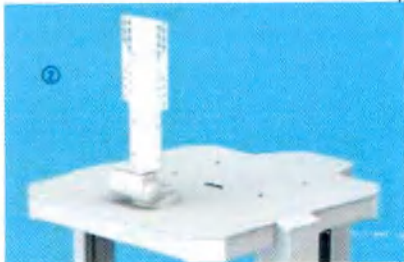
Набор ящиков с одним отделением	Особенности: полностью выдвижные телескопические рельсы с блокираторами не дают ящикам самопроизвольно выкатываться вперёд. Полностью выдвижные телескопические рельсы максимизируют пространство для хранения внутри ящика и упрощают уборку. Габаритные размеры: 424 x 430 x 175 мм. Полезная площадь: 400 мм x 384 мм. Грузоподъёмность: полка: 10 кг распределённого веса, ящик: 3 кг распределённого веса. Материал: сталь / алюминий / пластик. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Размещение: с помощью Т-образных пазов на передней части опорной стойки. Комплект поставки: 1 набор ящиков и крепёж, в собранном виде.	
Набор ящиков с одним отделением, ручка сбоку	Особенности: полностью выдвижные телескопические рельсы с блокираторами не дают ящикам самопроизвольно выкатываться вперёд. Полностью выдвижные телескопические рельсы максимизируют пространство для хранения внутри ящика и упрощают уборку. Габаритные размеры: 424 x 430 x 175 мм. Полезная площадь: 400 мм x 384 мм. Грузоподъёмность: полка: 10 кг распределённого веса, ящик: 3 кг распределённого веса. Материал: сталь / алюминий / пластик. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Размещение: с помощью Т-образных пазов на передней части опорной стойки. Комплект поставки: 1 набор ящиков и крепёж, в собранном виде.	
Набор ящиков, ручка сбоку	Особенности: полностью выдвижные телескопические рельсы с блокираторами не дают ящикам самопроизвольно выкатываться вперёд. Полностью выдвижные телескопические рельсы максимизируют пространство для хранения внутри ящика и упрощают уборку. Габаритные размеры: 424 x 430 x 90 мм. Полезная площадь: 400 мм x 384 мм. Грузоподъёмность: полка: 10 кг распределённого веса, ящик: 3 кг распределённого веса. Материал: сталь / алюминий / пластик. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Размещение: с помощью Т-образных пазов на передней части опорной стойки. Комплект поставки: 1 набор ящиков и крепёж, в собранном виде.	

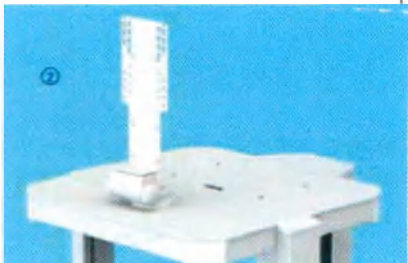
Набор ящиков, с подставкой для мыши	Особенности: полностью выдвижные телескопические рельсы с блокираторами не дают ящикам самопроизвольно выкатываться вперёд. Полностью выдвижные телескопические рельсы максимизируют пространство для хранения внутри ящика и упрощают уборку. Габаритные размеры: 424 x 430 x 90 мм. Полезная площадь: 400 мм x 384 мм. Грузоподъёмность: полка: 10 кг распределённого веса, ящик: 3 кг распределённого веса. Материал: сталь / алюминий / пластик. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Размещение: с помощью Т-образных пазов на передней части опорной стойки. Комплект поставки: 1 набор ящиков и крепёж, в собранном виде.	
Пластина	Неконтролируемый скачок напряжения может быть опасен для врачей и пациентов. Скачок напряжения обычно вызван разницей потенциалов между оборудованием и электропроводящими деталями в медицинских кабинетах. Установка эквипотенциальных розеток (пластин) является наиболее безопасным решением. Материал: латунное напыление/ сталь. Комплект поставки: 1 шт. эквипотенциальных розеток S6 DIN 42801, 1 шт. зелёных/жёлтых опознавательных знаков, 1 кронштейн и крепёж.	
Пластина с 4-мя штекерами	Неконтролируемый скачок напряжения может быть опасен для врачей и пациентов. Скачок напряжения обычно вызван разницей потенциалов между оборудованием и электропроводящими деталями в медицинских кабинетах. Установка эквипотенциальных розеток (пластин) является наиболее безопасным решением. Материал: латунное напыление/ сталь. Комплект поставки: 4 шт. эквипотенциальных розеток S6 DIN 42801, 4 шт. зелёных/жёлтых опознавательных знаков, 1 кронштейн и крепёж.	
Пластина с 8 штекерами	Неконтролируемый скачок напряжения может быть опасен для врачей и пациентов. Скачок напряжения обычно вызван разницей потенциалов между оборудованием и электропроводящими деталями в медицинских кабинетах. Установка эквипотенциальных розеток (пластин) является наиболее безопасным решением. Материал: латунное напыление/ сталь. Комплект поставки: 8 шт. эквипотенциальных розеток S6 DIN 42801, 8 шт. зелёных/жёлтых опознавательных знаков, 1 кронштейн и крепёж.	

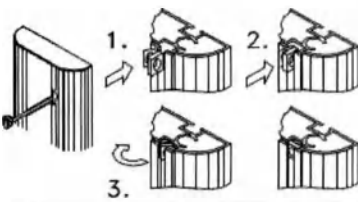
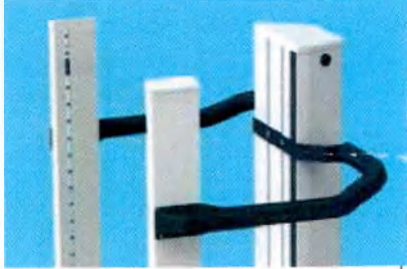
Полка	Изделия характеризуются вместительными полками с поднятыми краями и закруглёнными углами. Низкая высота установки экономит пространство и создаёт ценное пространство для других компонентов системы. Высота установки: 1 U (32 мм). Размеры: 424 мм x 430 мм. Полезная площадь: 400 мм x 384 мм. Грузоподъёмность: 15 кг распределённого веса. Материал: алюминий. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Размещение: с помощью Т-образных пазов на передней части опорной стойки. Комплект поставки: 1 полка и крепёж, в собранном виде.	
Полка с ручкой сбоку	Изделия характеризуются вместительными полками с поднятыми краями и закруглёнными углами. Низкая высота установки экономит пространство и создаёт ценное пространство для других компонентов системы. Высота установки: 1 U (32 мм). Размеры: 424 мм x 430 мм. Полезная площадь: 400 мм x 384 мм. Грузоподъёмность: 15 кг распределённого веса. Материал: алюминий. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Размещение: с помощью Т-образных пазов на передней части опорной стойки. Комплект поставки: 1 полка и крепёж, в собранном виде.	
Полка W450	Полка без ручки для хранения изделий. Высота установки: 1 U (32 мм) / высота компонента: 18 мм. Размеры (Ш x Г): 450 мм x 490 мм. Грузоподъёмность: 30 кг распределенная нагрузка. Материал: Сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 полка, включая сборочный материал. Полка предварительно установлена.	
Полка W450 с ручкой	Полка с ручкой для хранения изделий. Высота установки: 1 U (32 мм) / высота компонента: 18 мм. Размеры (Ш x Г): 450 мм x 490 мм. Грузоподъёмность: 30 кг распределенная нагрузка. Материал: Сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 полка, включая сборочный материал. Полка предварительно установлена.	

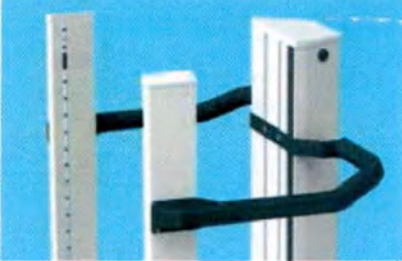
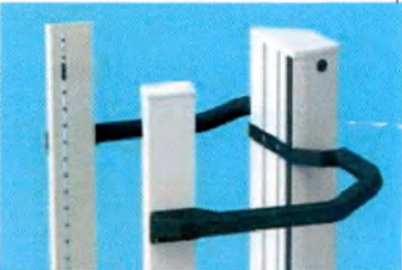
Полка W500	Полка без ручки для хранения изделий. Высота установки: 1 U (32 мм) / высота компонента: 18 мм. Размеры (Ш x Г): 500 мм x 490 мм. Грузоподъемность: 30 кг распределенная нагрузка. Материал: Сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 полка, включая сборочный материал. Полка предварительно установлена.	
Полка W500 с ручкой	Полка с ручкой для хранения изделий. Высота установки: 1 U (32 мм) / высота компонента: 18 мм. Размеры (Ш x Г): 500 мм x 490 мм. Грузоподъемность: 30 кг распределенная нагрузка. Материал: Сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 полка, включая сборочный материал. Полка предварительно установлена.	
Полка W650	Полка без ручки для хранения изделий. Высота установки: 1 U (32 мм) / высота компонента: 18 мм. Размеры (Ш x Г): 650 мм x 490 мм. Грузоподъемность: 30 кг распределенная нагрузка. Материал: Сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 полка, включая сборочный материал. Полка предварительно установлена.	
Полка W650 с ручкой	Полка с ручкой для хранения изделий. Высота установки: 1 U (32 мм) / высота компонента: 18 мм. Размеры (Ш x Г): 650 мм x 490 мм. Грузоподъемность: 30 кг распределенная нагрузка. Материал: Сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 полка, включая сборочный материал. Полка предварительно установлена.	
Полка на двойной держатель, W400	Особенности полки: - непрерывный приподнятый край обеспечивает надежную платформу для ценного медицинского оборудования. - закругленные углы защищают пользователей от травм. - поверхность с порошковым покрытием легко моется и устойчива к воздействию чистящих и дезинфицирующих средств. Грузоподъемность: до 15 кг (распределенная нагрузка). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Высота установки: 4 U (128 мм).	

	Комплект поставки: 1 полка с кронштейном, включая монтажное оборудование. Габаритные размеры: 968 x 400 мм.	
Полка на держатель, W400	Особенности полки: - непрерывный приподнятый край обеспечивает надежную платформу для ценного медицинского оборудования. - закругленные углы защищают пользователей от травм. - поверхность с порошковым покрытием легко моется и устойчива к воздействию чистящих и дезинфицирующих средств. Грузоподъемность: до 10 кг (распределенная нагрузка). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 полка с кронштейном, включая монтажное оборудование. Габаритные размеры: 548 x 400 мм.	
Полка на крепление, W400	Особенности полки: - непрерывный приподнятый край обеспечивает надежную платформу для ценного медицинского оборудования. - закругленные углы защищают пользователей от травм. - поверхность с порошковым покрытием легко моется и устойчива к воздействию чистящих и дезинфицирующих средств. Грузоподъемность: до 15 кг (распределенная нагрузка). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Высота установки: 4 U (128 мм). Комплект поставки: 1 полка с кронштейном, включая монтажное оборудование. Габаритные размеры: 400 x 548 мм.	
Полка на рельсу, W400	Особенности полки: - непрерывный приподнятый край обеспечивает надежную платформу для ценного медицинского оборудования. - закругленные углы защищают пользователей от травм. - поверхность с порошковым покрытием легко моется и устойчива к воздействию чистящих и дезинфицирующих средств. Грузоподъемность: до 10 кг (распределенная нагрузка). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 полка с кронштейном, включая монтажное оборудование. Габаритные размеры: 400 x 414 мм.	
Полка с отсеком для хранения W450	Изделие представляет собой полку с функцией запираемого хранения. Здесь можно надежно хранить кабели или блоки питания. Высота установки: 2 U (64 мм) / высота компонента: 52 мм. Размеры (Ш x Г): 450 x 490 мм. Грузоподъемность: 30 кг (распределенная нагрузка). Материал: Сталь/алюминий.	

	Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 полка, включая сборочный материал. Полка предварительно установлена.	
Полка с отсеком для хранения W500	Изделие представляет собой полку с функцией запираемого хранения. Здесь можно надежно хранить кабели или блоки питания. Высота установки: 2 U (64 мм) / высота компонента: 52 мм. Размеры (Ш x Г): 500 x 490 мм. Грузоподъемность: 30 кг (распределенная нагрузка). Материал: Сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 полка, включая сборочный материал. Полка предварительно установлена.	
Полка с отсеком для хранения W650	Изделие представляет собой полку с функцией запираемого хранения. Здесь можно надежно хранить кабели или блоки питания. Высота установки: 2 U (64 мм) / высота компонента: 52 мм. Размеры (Ш x Г): 650 x 490 мм. Грузоподъемность: 30 кг (распределенная нагрузка). Материал: Сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 полка, включая сборочный материал. Полка предварительно установлена.	
Полка с отсеком для хранения и держателем монитора W450	Изделие представляет собой полку с функцией запираемого хранения. Здесь можно надежно хранить кабели или блоки питания. Полка также может быть использована для установки монитора с VESA 75/100. Высота установки: 2 U (64 мм) / высота компонента: 52 мм. Размеры (Ш x Г): 450 x 490 мм. Грузоподъемность: 30 кг (распределенная нагрузка). Материал: Сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 полка, включая сборочный материал. Полка предварительно установлена.	
Полка с отсеком для хранения и держателем монитора W500	Изделие представляет собой полку с функцией запираемого хранения. Здесь можно надежно хранить кабели или блоки питания. Полка также может быть использована для установки монитора с VESA 75/100. Высота установки: 2 U (64 мм) / высота компонента: 52 мм. Размеры (Ш x Г): 500 x 490 мм. Грузоподъемность: 30 кг (распределенная нагрузка). Материал: Сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием.	

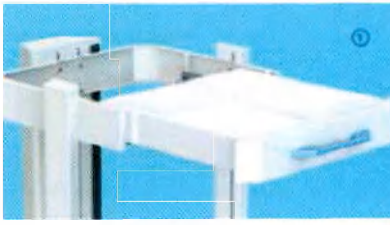
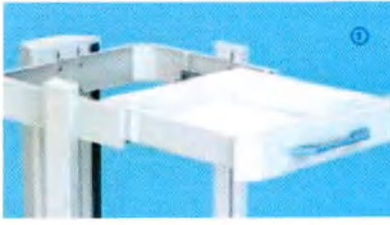
	Комплект поставки: 1 полка, включая сборочный материал. Полка предварительно установлена.	
Полка с отсеком для хранения и держателем монитора W650	Изделие представляет собой полку с функцией запираемого хранения. Здесь можно надежно хранить кабели или блоки питания. Полка также может быть использована для установки монитора с VESA 75/100. Высота установки: 2 U (64 мм) / высота компонента: 52 мм. Размеры (Ш x Г): 650 x 490 мм. Грузоподъемность: 30 кг (распределенная нагрузка). Материал: Сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 полка, включая сборочный материал. Полка предварительно установлена.	
Полка с подставкой для мыши	Полка характеризуется поднятыми краями и закругленными углами. Низкая высота установки экономит пространство и создаёт ценное пространство для других компонентов системы. Высота установки: 1 U (32 мм). Размеры: 424 мм x 430 мм. Полезная площадь: 400 мм x 384 мм. Грузоподъемность: 15 кг распределённого веса. Материал: алюминий. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Размещение: с помощью Т-образных пазов на передней части опорной стойки. Комплект поставки: 1 полка и крепёж, в собранном виде.	
Полка с ручкой	Полка характеризуется поднятыми краями и закругленными углами. Низкая высота установки экономит пространство и создаёт ценное пространство для других компонентов системы. Высота установки: 1 U (32 мм). Размеры: 424 мм x 430 мм. Полезная площадь: 400 мм x 384 мм. Грузоподъемность: 15 кг распределённого веса. Материал: алюминий. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Размещение: с помощью Т-образных пазов на передней части опорной стойки. Комплект поставки: 1 полка и крепёж, в собранном виде.	
Полка с ручкой и подставкой для мыши	Полка характеризуется поднятыми краями и закругленными углами. Низкая высота установки экономит пространство и создаёт ценное пространство для других компонентов системы. Высота установки: 1 U (32 мм). Размеры: 424 мм x 430 мм. Полезная площадь: 400 мм x 384 мм.	

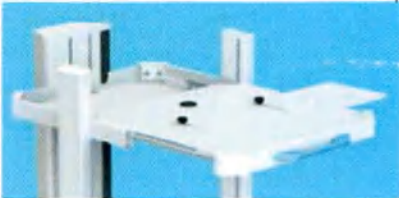
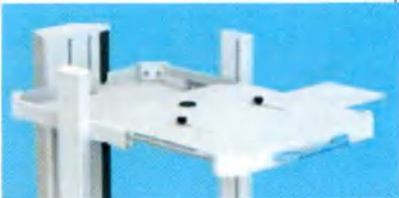
	Грузоподъемность: 15 кг распределённого веса. Материал: алюминий. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Размещение: с помощью Т-образных пазов на передней части опорной стойки. Комплект поставки: 1 полка и крепёж, в собранном виде.	
Полка, W400	Особенности полки: - непрерывный приподнятый край обеспечивает надежную платформу для ценного медицинского оборудования. - закругленные углы защищают пользователей от травм. - поверхность с порошковым покрытием легко моется и устойчива к воздействию чистящих и дезинфицирующих средств. Грузоподъемность: до 10 кг (распределенная нагрузка). Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Высота установки: 3 U (128 мм). Комплект поставки: 1 полка с кронштейном, включая монтажное оборудование. Габаритные размеры: 400 x 360 мм.	
Пружинная гайка M6	Пружинная гайка предназначена для крепления элементов системы и аксессуаров и используется с Т-образными пазами. Материал: сталь / nirosta 4310. Покрытие: оцинкованное. Комплект поставки: 50 штук.	
Ручка	Особенности ручки: - специально разработана для держателей мониторов с адаптацией VESA 75/100 (с помощью силы пружины). - благодаря изменчивости высоты возможно применение и оптимальное эргономичное позиционирование мониторов различных размеров. Материал: стальная пластина. Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 ручка, включая монтажное оборудование. Габаритные размеры: 370 x 335 мм.	
Ручка, W450	Вращающаяся высококачественная ручка позволяет гибко выбирать толкающую сторону для безопасного перемещения стойки с оборудованием. Высота установки: 3 U (96 мм) / высота компонента: 56 мм. Материал: Алюминий/сталь. Ширина: 450 мм ± 10 %. Комплект поставки: 1 ручка, включая сборочный материал, предварительно установлена.	

Ручка, W500	Вращающаяся высококачественная ручка позволяет гибко выбирать толкающую сторону для безопасного перемещения стойки с оборудованием. Высота установки: 3 U (96 мм) / высота компонента: 56 мм. Материал: Алюминий/сталь. Ширина: 500 мм $\pm$ 10 %. Комплект поставки: 1 ручка, включая сборочный материал, предварительно установлена.	
Ручка, W650	Вращающаяся высококачественная ручка позволяет гибко выбирать толкающую сторону для безопасного перемещения стойки с оборудованием. Высота установки: 3 U (96 мм) / высота компонента: 56 мм. Материал: Алюминий/сталь. Ширина: 650 мм $\pm$ 10 %. Комплект поставки: 1 ручка, включая сборочный материал, предварительно установлена.	
Сетевой кабель питания, 0,6 м	Кабель питания используется для EURO розеток с EURO быстросменным блоком. Подключение: IEC EURO розетка --> IEC EURO блок. Комплект поставки: 1 кабель питания. Длина: 0,6 м.	
Сетевой кабель питания, 1,0 м	Кабель питания используется для EURO розеток с EURO быстросменным блоком. Подключение: IEC EURO розетка --> IEC EURO блок. Комплект поставки: 1 кабель питания. Длина: 1,0 м.	
Сетевой кабель питания, 1,5 м	Кабель питания используется для EURO розеток с EURO быстросменным блоком. Подключение: IEC EURO розетка --> IEC EURO блок. Комплект поставки: 1 кабель питания. Длина: 1,5 м.	
Сетевой кабель питания, 2,0 м	Кабель питания используется для EURO розеток с EURO быстросменным блоком. Подключение: IEC EURO розетка --> IEC EURO блок. Комплект поставки: 1 кабель питания. Длина: 2,0 м.	
Сетевой кабель питания, 2,5 м	Кабель питания используется для EURO розеток с EURO быстросменным блоком. Подключение: IEC EURO розетка --> IEC EURO блок. Комплект поставки: 1 кабель питания. Длина: 2,5 м.	
Уголки крепления оборудования	Уголки не дают установленному оборудованию скользить по поверхности. Предназначены для использования на полках, ящиках, столешницах, тумбах и т.д. Толщина насадки 3 мм. На тыльной стороне насадок находится липкий слой, при	

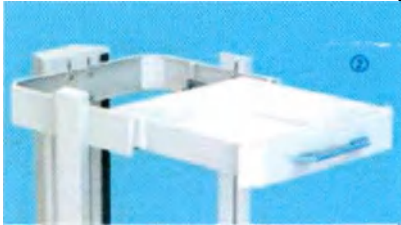
	необходимости насадки могут быть удалены с поверхности. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Комплект поставки: 4 насадки на углы и крепёж.	
Универсальная полка, W400	Полка подходит для всех моделей и почти незаметна. Высота установки: 2 U (64 мм). Полезная площадь: 400 мм x 400 мм. Грузоподъемность: 10 кг распределённого веса. Материал: сталь / алюминий. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый.	
Универсальный адаптер держателя монитора	Материал: сталь / алюминий / пластик. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Комплект поставки: 1 адаптер для монитора, крепёж и декоративные накладки (по запросу). Грузоподъемность: до 14 кг. Наклон: $\pm 20^\circ$ Поворот: $\pm 180^\circ$ Габаритные размеры: 127 x 213 x 127 мм.	
Универсальный держатель	Держатель монитора с адаптацией VESA 75/100, универсальный, устанавливается непосредственно на центральную медиа-колонну. Наклон держателя: $\pm 20^\circ$. Поворот держателя: $\pm 20^\circ$. Грузоподъемность: до 14 кг. Габаритные размеры: 100x300x70 мм. Материал: Сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 держатель монитора, включая монтажный материал.	
Фиксированный держатель	Держатель можно прикрепить к поручням и к круглым балкам диаметром до Ø 38 мм. Грузоподъемность: 5 кг. Материал: держатель: алюминий; крепёжная пластина: сталь. Покрытие: держатель: анодированное; крепёжная пластина: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Установка: на стандартный бегунок или поручень. Комплект поставки: 1 держатель.	
Штатив инфузионный, раздвижной	Штатив для внутривенных вливаний оборудован 4 прочными креплениями для ёмкостей. Стойка регулируется по высоте. Высота в максимально выдвинутом положении составляет 870 мм. Материал: сталь. Комплект поставки: 1 штатив, крепёжные детали. Грузоподъемность: 4 x 2 кг.	

Штатив инфузионный	Штатив для внутривенных вливаний оборудован 4 прочными креплениями для ёмкостей. Стойка регулируется по высоте. Высота в максимально выдвинутом положении составляет 870 мм. Материал: сталь. Комплект поставки: 1 штатив, крепёжные детали. Грузоподъемность: 4 x 5 кг.	
Электрический лоток	В электрическом лотке можно разместить и закрепить большой разветвитель и излишки кабеля. Он обеспечивает защиту от несанкционированного доступа и монтируется под полкой. В узкие отверстия на задней панели лотка можно разместить кабели и другую электроаппаратуру. Размеры: 330 мм x 390 мм x 70 мм. Грузоподъемность: 3 кг распределённого веса. Материал: сталь. Покрытие: порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Размещение: под полкой Комплект поставки: 1 электрический лоток и крепёж, в собранном виде.	
Электрический ящик с замком, 2 кг	Электрический ящик устанавливается под базовой рамой стойки, в нем аккуратно и безопасно хранятся электрооборудование и удлинители. Ящик не имеет направляющую с роликами, но может быть выдвинут полностью для ремонта и/или добавления электрооборудования. Грузоподъемность: 2 кг распределённого веса. Материал: сталь / пластик ABS. Покрытие: накладка: RAL 7035 светло-серый, электрошкаф: порошковое покрытие RAL 7043 транспортный серый. Размещение: под основанием опорной стойки. Комплект поставки: 1 электрический ящик, крепеж, в собранном виде. Габаритные размеры: 293x110x276 мм.	
Электрический ящик с замком, 3 кг	Электрический ящик устанавливается под базовой рамой стойки, в нем аккуратно и безопасно хранятся электрооборудование и удлинители. Ящик имеет направляющую с роликами и, следовательно, легко выдвигается. Грузоподъемность: 3 кг распределённого веса. Материал: сталь / пластик ABS. Покрытие: накладка: RAL 7035 светло-серый, электрошкаф: порошковое покрытие RAL 7043 транспортный серый. Размещение: под основанием опорной стойки. Комплект поставки: 1 электрический ящик, телескопическая рама, крепеж, в собранном виде. Габаритные размеры: 293x110x276 мм.	

Ящик W450	Выдвижной ящик отличается большим пространством для хранения и гладким съемным внутренним корпусом. Все выдвижные ящики оснащены выдвижными роликами. Габаритные размеры: 450 мм x 490 мм. Размеры пространства внутренней части ящика: 360 мм x 400 мм x 85 мм. Грузоподъемность: до 3 кг (распределенная нагрузка). Материал: Сталь / алюминий / пластик. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 выдвижной ящик, включая сборочный материал, предварительно установлен на стойку.	
Ящик W500	Выдвижной ящик отличается большим пространством для хранения и гладким съемным внутренним корпусом. Все выдвижные ящики оснащены выдвижными роликами. Габаритные размеры: 500 мм x 490 мм. Размеры пространства внутренней части ящика: 410 мм x 400 мм x 85 мм. Грузоподъемность: до 3 кг (распределенная нагрузка). Материал: Сталь / алюминий / пластик. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 выдвижной ящик, включая сборочный материал, предварительно установлен на стойку.	
Ящик W650	Выдвижной ящик отличается большим пространством для хранения и гладким съемным внутренним корпусом. Все выдвижные ящики оснащены выдвижными роликами. Габаритные размеры: 650 мм x 490 мм. Размеры пространства внутренней части ящика: 510 мм x 400 мм x 85 мм. Грузоподъемность: до 3 кг (распределенная нагрузка). Материал: Сталь / алюминий / пластик. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 выдвижной ящик, включая сборочный материал, предварительно установлен на стойку.	
Ящик двойной, W400	Особенности ящиков: - направляющие на роликах гарантируют легкое выдвижение выдвижных ящиков. - легко моется и устойчив к воздействию чистящих и дезинфицирующих средств. - верхняя часть ящика представляет собой полку. - закругленные края защищают от травм и являются важным элементом дизайна. Высота установки: 9 U (288 мм).	

		Грузоподъемность: полки: до 5 кг (распределенная нагрузка); выдвижной ящик: до 3 кг. Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 выдвижной ящик, включая монтажное оборудование Габаритные размеры: 400 мм x 360 мм.	
Ящик клавиатуры с подставкой для мыши	для с для	Ящик для клавиатуры монтируется непосредственно на опорную стойку и обычно помещается под обычную полку. Ящик для клавиатуры выдвигается вперед на 160 мм. При вытягивании ящика вперед и при нажатии клавиатура и мышь надёжно закреплены. Встроенную подставку для мыши можно вытянуть влево или вправо. Высота установки: 2 U (64 мм). Грузоподъемность: 5 кг распределённого веса. Материал: сталь / алюминий. Покрытие: Порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый. Размещение: с помощью Т-образных пазов на передней части опорной стойки Комплект поставки: 1 ящик для клавиатуры с подставкой для мыши и крепёж, в собранном виде. Габаритные размеры: 450 x 60 x 515 мм.	
Ящик клавиатуры с подставкой мыши, W450	для с для	Выдвижной ящик для клавиатуры. Два регулируемых упора предотвращают соскальзывание клавиатуры назад. Встроенный коврик для мыши можно выдвигать вправо и влево. Высота установки: 4 U (128 мм) / высота компонента: 90 мм. Грузоподъемность: 10 кг (распределенная нагрузка). Глубина в выдвинутом состоянии: 274 мм. Ширина: 400 мм ± 10 %. Материал: Сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 выдвижной ящик для клавиатуры, включая сборочный материал, ящик предварительно установлен.	
Ящик клавиатуры с подставкой мыши, W500	для с для	Выдвижной ящик для клавиатуры. Два регулируемых упора предотвращают соскальзывание клавиатуры назад. Встроенный коврик для мыши можно выдвигать вправо и влево. Высота установки: 4 U (128 мм) / высота компонента: 90 мм. Грузоподъемность: 10 кг (распределенная нагрузка). Глубина в выдвинутом состоянии: 274 мм. Ширина: 500 мм ± 10 %. Материал: Сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 выдвижной ящик для клавиатуры, включая сборочный материал, ящик предварительно установлен.	

Ящик для клавиатуры с подставкой для мыши, W650	Выдвижной ящик для клавиатуры. Два регулируемых упора предотвращают соскальзывание клавиатуры назад. Встроенный коврик для мыши можно выдвигать вправо и влево. Высота установки: 4 U (128 мм) / высота компонента: 90 мм. Грузоподъемность: 10 кг (распределенная нагрузка). Глубина в выдвинутом состоянии: 274 мм. Ширина: 650 мм ± 10 %. Материал: Сталь/алюминий. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 выдвижной ящик для клавиатуры, включая сборочный материал, ящик предварительно установлен.	
Ящик на рельсу	Особенности ящиков: - направляющие на роликах гарантируют легкое выдвижение выдвижных ящиков. - легко моется и устойчив к воздействию чистящих и дезинфицирующих средств. - верхняя часть ящика представляет собой полку. - закругленные края защищают от травм и являются важным элементом дизайна. Высота установки: 6 U (192 мм). Грузоподъемность: полки: до 10 кг (распределенная нагрузка); выдвижной ящик: до 3 кг. Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 выдвижной ящик, включая монтажное оборудование. Габаритные размеры: 400 мм x 366 мм.	
Ящик с замком W450	Выдвижной ящик отличается большим пространством для хранения и гладким съемным внутренним корпусом. Все выдвижные ящики оснащены выдвижными роликами. Габаритные размеры: 450 мм x 490 мм. Размеры пространства внутренней части ящика: 360 мм x 400 мм x 85 мм. Грузоподъемность: до 3 кг (распределенная нагрузка). Материал: Сталь / алюминий / пластик. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 выдвижной ящик, включая сборочный материал, предварительно установлен на стойку.	
Ящик с замком W500	Выдвижной ящик отличается большим пространством для хранения и гладким съемным внутренним корпусом. Все выдвижные ящики оснащены выдвижными роликами. Габаритные размеры: 500 мм x 490 мм. Размеры пространства внутренней части ящика: 410 мм x 400 мм x 85 мм.	

	Грузоподъемность: до 3 кг (распределенная нагрузка). Материал: Сталь / алюминий / пластик. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 выдвижной ящик, включая сборочный материал, предварительно установлен на стойку.	
Ящик с замком W650	Выдвижной ящик отличается большим пространством для хранения и гладким съёмным внутренним корпусом. Все выдвижные ящики оснащены выдвижными роликами. Габаритные размеры: 650 мм x 490 мм. Размеры пространства внутренней части ящика: 510 мм x 400 мм x 85 мм. Грузоподъемность: до 3 кг (распределенная нагрузка). Материал: Сталь / алюминий / пластик. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 выдвижной ящик, включая сборочный материал, предварительно установлен на стойку.	
Ящик с одним отделением, W450	Выдвижной ящик отличается большим пространством для хранения и гладким съёмным внутренним корпусом. Все выдвижные ящики оснащены выдвижными роликами. Габаритные размеры: 450 мм x 490 мм. Размеры пространства внутренней части ящика: 360 мм x 400 мм x 180 мм. Грузоподъемность: до 3 кг (распределенная нагрузка). Материал: Сталь / алюминий / пластик. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 выдвижной ящик, включая сборочный материал, предварительно установлен на стойку.	
Ящик с одним отделением, W500	Выдвижной ящик отличается большим пространством для хранения и гладким съёмным внутренним корпусом. Все выдвижные ящики оснащены выдвижными роликами. Габаритные размеры: 500 мм x 490 мм. Размеры пространства внутренней части ящика: 410 мм x 400 мм x 180 мм. Грузоподъемность: до 3 кг (распределенная нагрузка). Материал: Сталь / алюминий / пластик. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 выдвижной ящик, включая сборочный материал, предварительно установлен на стойку.	

Ящик с одним отделением, W650	Выдвижной ящик отличается большим пространством для хранения и гладким съемным внутренним корпусом. Все выдвижные ящики оснащены выдвижными роликами. Габаритные размеры: 650 мм x 490 мм. Размеры пространства внутренней части ящика: 510 мм x 400 мм x 180 мм. Грузоподъемность: до 3 кг (распределенная нагрузка). Материал: Сталь / алюминий / пластик. Поверхность: RAL 9016 дорожно-белый, с порошковым покрытием. Комплект поставки: 1 выдвижной ящик, включая сборочный материал, предварительно установлен на стойку.	
Ящик, W400	Особенности ящиков: - направляющие на роликах гарантируют легкое выдвижение выдвижных ящиков. - легко моется и устойчив к воздействию чистящих и дезинфицирующих средств. - верхняя часть ящика представляет собой полку. - закругленные края защищают от травм и являются важным элементом дизайна. Высота установки: 6 U (192 мм). Грузоподъемность: полки: до 10 кг (распределенная нагрузка); выдвижной ящик: до 3 кг. Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 выдвижной ящик, включая монтажное оборудование. Габаритные размеры: 400 мм x 360 мм.	
Ящик, W450	Особенности ящиков: - направляющие на роликах гарантируют легкое выдвижение выдвижных ящиков. - легко моется и устойчив к воздействию чистящих и дезинфицирующих средств. - верхняя часть ящика представляет собой полку. - закругленные края защищают от травм и являются важным элементом дизайна. Высота установки: 6 U (192 мм). Грузоподъемность: полки: до 10 кг (распределенная нагрузка); выдвижной ящик: до 3 кг. Отделка: RAL 7035 светло-серое порошковое покрытие. Комплект поставки: 1 выдвижной ящик, включая монтажное оборудование. Габаритные размеры: 450 мм x 491 мм.	

Примечание: допуски на технические характеристики составляют $\pm 5\%$, если не указано иное.

19. Комплект поставки

Комплект поставки медицинского изделия указан в Пункте 1
Наименование.

20. Риски при применении медицинского изделия

Анализ риска, связанного со «стойкой медицинской для аппаратуры в составе в вариантах исполнения с принадлежностями», выполнялся в соответствии с требованиями стандарта ISO 14971. Результаты анализа риска продемонстрировали, что анализ риска выполнен соответствующим образом и все риски, связанные с применением генератора технеция, перевешиваются клинической пользой, а уровень рисков является минимальным разумно практически достижимым для изделий данного типа. Результаты анализа риска представлены ниже.

Оценивался каждый выявленный риск.

Все остаточные риски являются приемлемыми.

Суммарный уровень остаточных рисков является приемлемым.

Результаты анализа риска представлены в документе «Файл менеджмента риска».

21. Схема производственного процесса

Контроль качества продукции, от входного контроля до отправления	
Прием готовых изделий	Контроль Идентификацио нных кодов в соответствии с документами закупки
Гарантия качества	Входной контроль в соответствии с РА-010
Складское хранение и ввод в эксплуатацию	Визуальный осмотр на отсутствие повреждений и чистоту

Предварительная сборка	Проверка компонентов: визуальный осмотр с целью выявления дефектов поверхности и повреждений в соответствии с директивой RL-003. Проверка установки. Самоконтроль предварительной сборки в соответствии с документами руководства по эксплуатации
Окончательная сборка	Проверка компонентов: визуальный осмотр с целью выявления дефектов поверхности и повреждений в соответствии с директивой RL-003. Проверка установки в соответствии с руководством по эксплуатации. Доступ к спецификации и чертежу. Самоконтроль предварительной сборки в соответствии с документами руководства по эксплуатации
Электрические испытания	Визуальный осмотр готовой продукции 100% Электрические испытания в соответствии с РА-005
Упаковка	Самоконтроль упаковки в соответствии с АА и документами руководства по эксплуатации Проверка укомплектованности заказа Проверка упаковки
Отправление	Проверка отгрузочных документов

22. Заявление производителя по ЭМС

Указанные в данном разделе требования в части электромагнитной совместимости в соответствии со стандартом IEC 60601-1-2 распространяются на стойки, непосредственно использующие электрическую энергию для функционирования, а также на другие варианты стоек в случае подключения сторонних электрических изделий к питающей сети через сетевые разветвители, вмонтированные в стойки (при заказе сетевых разветвителей в качестве принадлежностей), а также при подключении сторонних электрических изделий к питающей сети через изолирующие трансформаторы, входящие в состав некоторых вариантов стоек. При таком подключении стойка и сторонние электрические изделия образуют медицинскую электрическую систему.

Примечание: стойки, работающие в составе медицинской электрической системы, т.е. подключенные к сети и соединенные с другими электрическими изделиями, будут называться в обоих случаях одинаково – «стойка».

Электромагнитная совместимость находящихся на стойке электромедицинских приборов проверяется специалистом, отвечающим за подбор/комбинирование приборов, только для поставляемой комбинации оборудования. Перед использованием в медицинских целях новой комбинации приборов необходимо проверить электромагнитную совместимость каждого прибора.

Использование стойки в среде ядерных спинов не допускается из-за ферромагнитных материалов. Компания ITD GmbH не несёт ответственности за последствия, явившиеся результатом использования стойки в такой среде!

Использование стойки с развязывающим трансформатором во взрывоопасной среде не допускается.

Компании ITD GmbH не знаком ни один прибор или аксессуар, который снижает минимальную безопасность системы. На стойке должны применяться только те приборы, которые не представляют никакой опасности. При необходимости это следует выяснить путём анализа рисков.

ВНИМАНИЕ!

Стойка генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Стойка требует применения специальных мер для обеспечения электромагнитной совместимости и должна быть установлена и введена в эксплуатацию в соответствии с информацией, относящейся к ЭМС, приведенной в эксплуатационной документации.

В случае неправильной установки и эксплуатации без соблюдения инструкций стойка может создавать радиопомехи. Однако нет гарантии отсутствия помех в конкретных условиях установки.

На работу стойки могут влиять внешние электромагнитные поля, создаваемые медицинским оборудованием, не соответствующим требованиям ЭМС, и другие источники электромагнитного излучения (например, мобильные радиочастотные средства связи).

При обслуживании стойки используйте только запасные компоненты, принадлежности, кабели и дополнительное оборудование, поставляемые и одобренные производителем. Несоблюдение этого предостережения может привести к увеличению электромагнитной эмиссии или снижению помехоустойчивости стойки.

Руководство и заявление изготовителя - электромагнитное излучение		
Стойки предназначены для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю Стойки следует обеспечить их применение в указанной электромагнитной обстановке		
Испытание на электромагнитную эмиссию	Соответствие	Электромагнитная среда - руководство

CISPR 11, радиопомехи	Группа 1	Стойка использует радиочастотную энергию только для своей внутренней функции. Уровень эмиссии радиочастотных помех является низким и, вероятно, не приведет к нарушениям функционирования расположенного вблизи электронного оборудования
CISPR 11, радиопомехи	Класс В	Стойка подходит для использования во всех помещениях, включая жилые и те, которые непосредственно подключены к общественной сети низковольтного питания, которая питает жилые здания.
Гармонические составляющие тока IEC 61000-3-2	Класс В	
Колебания напряжения и фликер IEC 61000-3-3	Соответствует	

Руководство и заявление изготовителя - защита от электромагнитных полей			
Стойки предназначены для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю Стойки следует обеспечить их применение в указанной электромагнитной обстановке			
Испытание на помехоустойчивость	Испытываемый уровень согласно IEC 60601	Уровень соответствия	Электромагнитная среда - руководство
Электростатический разряд (ЭСР) IEC 61000-4-2	± 6 кВ контакт ± 8 кВ воздух	± 6 кВ контакт ± 8 кВ воздух	Полы должны иметь деревянное, бетонное или кафельное покрытие. Если полы покрыты синтетическим материалом, относительная влажность воздуха должна быть не менее 30%.
Наносекундные импульсные помехи IEC 61000-4-4	± 2 кВ для линий электропитания ± 1 кВ для входных/выходных линий	± 2 кВ для линий электропитания ± 1 кВ для входных/выходных линий	Качество основного электроснабжения должно соответствовать обычной коммерческой или больничной среде.
Микросекундные импульсные помехи большой энергии IEC 61000-4-5	± 1 кВ междуфазовый ± 2 кВ между фазой и землей	± 1 кВ междуфазовый ± 2 кВ между фазой и землей	Качество основного электроснабжения должно соответствовать обычной коммерческой или больничной среде.
Провалы напряжения, кратковременные прерывания и изменения напряжения во входных линиях электропитания IEC 61000-4-11	$<5\% U_T$ ($>95\%$ падение U_T) за 0.5 цикла; $40\% U_T$ (60% падение U_T) за 5 циклов; $70\% U_T$ (30% падение U_T) за 25 циклов; $<5\% U_T$ ($>95\%$ падение	$<5\% U_T$ ($>95\%$ падение U_T) за 0.5 цикла; $40\% U_T$ (60% падение U_T) за 5 циклов; $70\% U_T$ (30% падение U_T) за 5 циклов; $<5\% U_T$ ($>95\%$ падение	Качество основного электроснабжения должно соответствовать обычной коммерческой или больничной среде. Если пользователю Стойки требуется непрерывная работа во время перебоев в основном электроснабжении, рекомендуется подключать Стойку к источнику бесперебойного питания или

	U_I) за 5 сек	за 25 циклов; $<5\% \quad U_I \quad (>95\%$ падение U_I) за 5 сек	батареи.
Магнитное поле промышленной частоты (50/60 Гц) IEC 61000-4-8	3 А/м	3 А/м	Магнитное поле промышленной частоты должно быть на уровне, характерном для типичного местоположения в обычной коммерческой или больничной среде.
ПРИМЕЧАНИЕ: U_I является напряжением сети переменного тока до использования испытательного уровня.			

Руководство и заявление изготовителя - защита от электромагнитных полей			
Стойки предназначены для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю Стойки следует обеспечить их применение в указанной электромагнитной обстановке			
Испытание на устойчивость	Испытываемый уровень согласно IEC 60601	Уровень соответствия	Электромагнитная среда - руководство
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями IEC 61000-4-6	3 В (среднеквадратическое напряжение) в полосе от 150 кГц до 80 МГц	3 В	Портативное и мобильное оборудование радиосвязи не должно использоваться возле любой части устройства, включая кабели, на расстоянии меньше рекомендуемого, рассчитанного по формуле, применимого к частоте передатчика. Рекомендуемый пространственный разнос: $d = 1,2\sqrt{P}$
		3 В/м	$d = 1,2\sqrt{P}$ (от 80 МГц до 800 МГц); $d = 2,3\sqrt{P}$ (от 800 МГц до 2,5 ГГц); где Р это максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) по данным производителя передатчика, а d это рекомендуемый пространственный разнос в метрах (м). Напряженность поля стационарных радиочастотных передатчиков, согласно данным исследования электромагнитного поля на месте, ^a должна быть ниже уровня
Радиочастотное электромагнитное поле IEC 61000-4-3	3 В/м в полосе 80 МГц – 2,5 ГГц		

			соответствия в каждом частотном диапазоне. ^б Помехи могут возникать в непосредственной близости от оборудования, обозначенного следующим символом: 
--	--	--	---

ПРИМЕЧАНИЕ 1: при 80 МГц и 800 МГц используется диапазон повышенных частот.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Эти принципы не могут применяться во всех ситуациях. Распространение электромагнитного излучения зависит от поглощения и отражения от конструкций, объектов и людей.

- а) Напряженность поля от стационарных передатчиков, таких как базовые станции радио (сотовых/беспроводных) телефонов и наземных мобильных радиостанций, любительского радио, станций АМ- и FM-радиовещания и телевизионного вещания не может быть теоретически точно спрогнозирована.

Для оценки электромагнитной обстановки за счет стационарных радиочастотных передатчиков, следует рассмотреть необходимость проведения исследования электромагнитного поля на месте.

Если измеренная напряженность поля в месте, в котором используется Стойка, превышает вышеуказанный допустимый уровень радиочастот, за Стойкой следует наблюдать для проверки нормальной работы. При обнаружении нарушений в работе, могут потребоваться дополнительные меры, например, переориентация или перемещение Стойки.

- б) В диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть менее 3 В/м.

Разделительные расстояния между портативными и мобильными средствами РЧ-связи и Стойкой

Рекомендуемый пространственный разнос между портативным и мобильным оборудованием радиосвязи и Стойкой

Стойка предназначена для использования в электромагнитной среде, в которой контролируются излучаемые ВЧ-помехи. Заказчик или пользователь Стойки может помочь предотвратить возникновение электромагнитных помех, сохраняя минимальное расстояние между портативным и мобильным оборудованием радиосвязи (передатчиками) и Стойкой, как рекомендовано ниже, в соответствии с максимальной выходной мощностью оборудования связи.

Номинальная максимальная выходная мощность передатчика Вт	Пространственный разнос в зависимости от частоты передатчика, м		
	От 150 кГц до 80 МГц $d = 1.2\sqrt{P}$	От 80 МГц до 800 МГц $d = 1.2\sqrt{P}$	От 800 МГц до 2,5 ГГц $d = 2.3\sqrt{P}$

0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью не указанных выше, рекомендуемый пространственный разброс d в метрах (м) можно рассчитать с помощью формулы, применимой к частоте передатчика, где P это максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) в зависимости от производителя передатчика.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: при 80 МГц и 800 МГц используется пространственный разнос для диапазона повышенных частот.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Эти принципы не могут применяться во всех ситуациях. Распространение электромагнитного излучения зависит от поглощения и отражения от конструкций, объектов и людей.

23. Перечень международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие

Применимый стандарт	Описание
ISO 13485	Изделия медицинские – Системы менеджмента качества – Требования для целей нормативного регулирования
ISO 14971	Медицинские изделия. Применение процесса управления рисками к медицинским изделиям
IEC 60601-1	Медицинское электрическое оборудование. Часть 1. Общие требования к базовой безопасности и существенным характеристикам
IEC 60601-1-2	Изделия медицинские электрические — Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Вспомогательный стандарт: электромагнитная совместимость — требования и испытания
IEC 60601-1-6	Медицинское электрическое оборудование — Часть 1-6. Общие требования к базовой безопасности и существенным характеристикам. Вспомогательный стандарт: эксплуатационная пригодность
IEC 62366	Медицинские изделия. Применение проектирования с учетом удобства использования медицинских изделий
EN 1041	Информация, предоставляемая изготовителем медицинских приборов
ISO 15223-1	Медицинские изделия. Символы, которые будут использоваться с метками медицинского устройства, маркировкой и информацией, которая будет поставляться - Часть 1: Общие требования
IEC 61558-1	Безопасность трансформаторов, реакторов, блоков питания и их комбинаций - Часть 1: Общие требования и испытания
IEC 61558-2-4	Безопасность трансформаторов, реакторов, блоков питания и их комбинаций - Часть 2-4: Частные требования и испытания для разделительных трансформаторов и блоков питания, включающих разделительные трансформаторы для общего применения

24. Уполномоченный представитель производителя на территории РФ

При возникновении вопросов, проблем или неполадок обращайтесь к уполномоченному представителю компании:

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская
Инвестиционная Компания»

ООО «МедИнКом»

Россия, 443087, Самарская область, г. Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 356,
кв. 176.

+7 (846) 203-17-84

info@medincom.org

Перевод с английского языка и немецкого языка на русский язык

1052/2023

РАЗРАБОТЧИК

Ай Ти Ди, ГмбХ, Шпортлатцштр. 3, 84381 Йоханнискирхен, Германия

Утверждаю

Ай Ти Ди ГмбХ

Дата: 29.03.2023

/подпись/

(подпись)

Ответственное лицо

(представитель) Альфонс Бруммер

Штамп

Штамп:

Ай Ти Ди, ГмбХ

Шпортлатцштрассе 3

84381 Йоханнискирхен,

Тел.: +49-89-61 44 25-0

Факс: +49-89-61 44 25-499

№ в реестре нотариальных действий: 1054/2023

настоящим удостоверяю, что подпись под этим документом была сделана

Альфонсом Бруммером

29.02.1960 г.р.

Бисхоф-Энгилмар-штр. 16, 84347 Пфарркирхен,

известным мне лично

**действующим от имени компании Ай Ти Ди, ГмбХ, Шпортлатцштр. 3, 84381
Йоханнискирхен, в качестве директора компании.**

**Проверив торговый реестр 31 марта 2023 года, я также подтверждаю, что Ай Ти
Ди, ГмбХ зарегистрирована в муниципальном суде Ландсхута — Единый
государственный реестр хозяйствующих субъектов — под номером HRB 4170 и
что г-н Альфонс Бруммер имеет право выступать в качестве юридического**

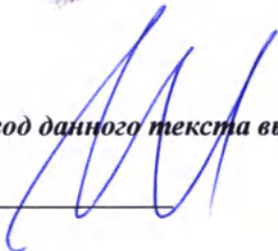
представителя данной компании.

Пфэрркйрхен, 31 марта 2023 г.

/Подпись/

Др. Фар нотариус

/печать нотариуса д-ра Фара/


Перевод данного текста выполнен переводчиком Марковым Иваном Николаевичем.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать второго мая две тысячи двадцать третьего года

Я, Корсик Владимир Константинович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика, Маркова Ивана Николаевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2138-н/77-2023-19 -2173
Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 100 лист(а)(ов)

Нотариус



В. К. Корсик

