

APEXMED

«Подтверждаю точность, правильность и
I hereby certify accuracy, correctness and
достоверность содержания текста перевода
reliability of this document translated
на русский язык»
into Russian

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Катетер аспирационный APEXMED стерильный одноразовый, в
вариантах исполнения**

Производитель медицинского изделия:

Apexmed International B.V. (Апексмед Интернэшнл Б.В.),
Keizersgracht 62-64, 1015CS Amsterdam, The Netherlands (Кайзерсграхт 62-64, 1015 CS г.
Амстердам, Нидерланды)

Место производства:

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd., (Нинбо Грейткае Трейдинг Ко., Лтд.), Unit 93,
Building 12, № 818, Qiming Road, Yinzhou 315105, Ningbo, Zhejiang, China (Блок 93,
корпус №818, Киминг Роуд, Иньчжоу, 315105 Нинбо, Китай).

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Apexmed International B.V.,
(Апексмед Интернэшнл Б.В.)

Управляющий директор / Managing director

(должность/position)

Rashid Biktogirov

(Имя/name)

(Подпись/signature)



«день» месяц / «day» month

СОДЕРЖАНИЕ

1	НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	3
2	НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА.....	23
3	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	23
4	ДАННЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	23
5	УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ	25
6	СТЕРИЛИЗАЦИЯ	25
7	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	26
8	УПАКОВКА.....	27
9	МАРКИРОВКА	28
10	СРОК ГОДНОСТИ.....	29
11	УТИЛИЗАЦИЯ	30
12	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НАЗВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НА ПРИНЯТИЕ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА	30

1 НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер аспирационный APEXMED стерильный одноразовый, в вариантах исполнения

1. Катетер аспирационный с прямым коннектором, размер CH/FR 4 (1,33мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
2. Катетер аспирационный с прямым коннектором, размер CH/FR 5 (1,67мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
3. Катетер аспирационный с прямым коннектором, размер CH/FR 6 (2мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
4. Катетер аспирационный с прямым коннектором, размер CH/FR 8 (2,67мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
5. Катетер аспирационный с прямым коннектором, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
6. Катетер аспирационный с прямым коннектором, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
7. Катетер аспирационный с прямым коннектором, размер CH/FR 14 (4,67мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
8. Катетер аспирационный с прямым коннектором, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
9. Катетер аспирационный с прямым коннектором, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
10. Катетер аспирационный с прямым коннектором, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный с прямым коннектором – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
11. Катетер аспирационный с прямым коннектором, размер CH/FR 22 (7,3мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
 12. Катетер аспирационный с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 4 (1,33мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
 13. Катетер аспирационный с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 5 (1,67мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
 14. Катетер аспирационный с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 6 (2мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
 15. Катетер аспирационный с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 8 (2,67мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
 16. Катетер аспирационный с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
 17. Катетер аспирационный с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
 18. Катетер аспирационный с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 14 (4,67мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
 19. Катетер аспирационный с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
 20. Катетер аспирационный с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
 21. Катетер аспирационный с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в

составе:

- катетер аспирационный с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

22. Катетер аспирационный с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 4 (1,33мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный с коннектором Y -Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

23. Катетер аспирационный с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 5 (1,67мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный с коннектором Y -Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

24. Катетер аспирационный с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 6 (2мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный с коннектором Y -Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

25. Катетер аспирационный с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 8 (2,67мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

26. Катетер аспирационный с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

27. Катетер аспирационный с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

28. Катетер аспирационный с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 14 (4,67мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

29. Катетер аспирационный с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

30. Катетер аспирационный с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

31. Катетер аспирационный с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;

составе:

- катетер аспирационный с коннектором Carcon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

43. Катетер аспирационный с коннектором Carcon, размер CH/FR 5 (1,67мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный с коннектором Carcon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

44. Катетер аспирационный с коннектором Carcon, размер CH/FR 6 (2мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный с коннектором Carcon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

45. Катетер аспирационный с коннектором Carcon, размер CH/FR 8 (2,67мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный с коннектором Carcon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

46. Катетер аспирационный с коннектором Carcon, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный с коннектором Carcon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

47. Катетер аспирационный с коннектором Carcon, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный с коннектором Carcon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

48. Катетер аспирационный с коннектором Carcon, размер CH/FR 14 (4,67мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный с коннектором Carcon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

49. Катетер аспирационный с коннектором Carcon, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный с коннектором Carcon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

50. Катетер аспирационный с коннектором Carcon, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный с коннектором Carcon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

51. Катетер аспирационный с коннектором Carcon, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный с коннектором Carcon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

52. Катетер аспирационный с коннектором Carcon, размер CH/FR 22 (7,3мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный с коннектором Carcon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

53. Катетер аспирационный Mully с прямым коннектором, размер CH/FR 6 (2мм x 500мм) в

составе:

- катетер аспирационный Mully с прямым коннектором – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

54. Катетер аспирационный Mully с прямым коннектором, размер CH/FR 8 (2,67мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный Mully с прямым коннектором – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

55. Катетер аспирационный Mully с прямым коннектором, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный Mully с прямым коннектором – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

56. Катетер аспирационный Mully с прямым коннектором, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный Mully с прямым коннектором – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

57. Катетер аспирационный Mully с прямым коннектором, размер CH/FR 14 (4,67мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный Mully с прямым коннектором – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

58. Катетер аспирационный Mully с прямым коннектором, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный Mully с прямым коннектором – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

59. Катетер аспирационный Mully с прямым коннектором, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный Mully с прямым коннектором – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

60. Катетер аспирационный Mully с прямым коннектором, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный Mully с прямым коннектором – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

61. Катетер аспирационный Mully с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 6 (2мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный Mully с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

62. Катетер аспирационный Mully с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 8 (2,67мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный Mully с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

63. Катетер аспирационный Mully с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный Mully с коннектором T-Vacon – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
64. Катетер аспирационный Mully с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
65. Катетер аспирационный Mully с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 14 (4,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
66. Катетер аспирационный Mully с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
67. Катетер аспирационный Mully с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
68. Катетер аспирационный Mully с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
69. Катетер аспирационный Mully с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 6 (2мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
70. Катетер аспирационный Mully с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 8 (2,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
71. Катетер аспирационный Mully с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
72. Катетер аспирационный Mully с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
73. Катетер аспирационный Mully с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 14 (4,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;

74. Катетер аспирационный Mully с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
75. Катетер аспирационный Mully с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
76. Катетер аспирационный Mully с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
77. Катетер аспирационный Mully с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 6 (2мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
78. Катетер аспирационный Mully с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 8 (2,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
79. Катетер аспирационный Mully с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
80. Катетер аспирационный Mully с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
81. Катетер аспирационный Mully с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 14 (4,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
82. Катетер аспирационный Mully с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
83. Катетер аспирационный Mully с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
84. Катетер аспирационный Mully с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный Mully с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
85. Катетер аспирационный Mully с коннектором Carcon, размер CH/FR 6 (2мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
86. Катетер аспирационный Mully с коннектором Carcon, размер CH/FR 8 (2,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
87. Катетер аспирационный Mully с коннектором Carcon, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
88. Катетер аспирационный Mully с коннектором Carcon, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
89. Катетер аспирационный Mully с коннектором Carcon, размер CH/FR 14 (4,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
90. Катетер аспирационный Mully с коннектором Carcon, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
91. Катетер аспирационный Mully с коннектором Carcon, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
92. Катетер аспирационный Mully с коннектором Carcon, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Mully с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
93. Катетер аспирационный Elephant с прямым коннектором, размер CH/FR 6 (2мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
94. Катетер аспирационный Elephant с прямым коннектором, размер CH/FR 8 (2,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;

- индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 95. Катетер аспирационный Elephant с прямым коннектором, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный Elephant с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 96. Катетер аспирационный Elephant с прямым коннектором, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный Elephant с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 97. Катетер аспирационный Elephant с прямым коннектором, размер CH/FR 14 (4,67мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный Elephant с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 98. Катетер аспирационный Elephant с прямым коннектором, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный Elephant с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 99. Катетер аспирационный Elephant с прямым коннектором, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный Elephant с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 100. Катетер аспирационный Elephant с прямым коннектором, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный Elephant с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 101. Катетер аспирационный Elephant с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 6 (2мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный Elephant с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 102. Катетер аспирационный Elephant с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 8 (2,67мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный Elephant с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 103. Катетер аспирационный Elephant с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный Elephant с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 104. Катетер аспирационный Elephant с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный Elephant с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 105. Катетер аспирационный Elephant с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 14 (4,67мм x

- 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
106. Катетер аспирационный Elephant с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
107. Катетер аспирационный Elephant с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
108. Катетер аспирационный Elephant с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
109. Катетер аспирационный Elephant с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 6 (2мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
110. Катетер аспирационный Elephant с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 8 (2,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
111. Катетер аспирационный Elephant с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
112. Катетер аспирационный Elephant с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
113. Катетер аспирационный Elephant с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 14 (4,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
114. Катетер аспирационный Elephant с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
115. Катетер аспирационный Elephant с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
116. Катетер аспирационный Elephant с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
117. Катетер аспирационный Elephant с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 6 (2мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
118. Катетер аспирационный Elephant с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 8 (2,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
119. Катетер аспирационный Elephant с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
120. Катетер аспирационный Elephant с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
121. Катетер аспирационный Elephant с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 14 (4,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
122. Катетер аспирационный Elephant с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
123. Катетер аспирационный Elephant с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
124. Катетер аспирационный Elephant с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
125. Катетер аспирационный Elephant с коннектором Carcon, размер CH/FR 6 (2мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;

126. Катетер аспирационный Elephant с коннектором Carcon, размер CH/FR 8 (2,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
127. Катетер аспирационный Elephant с коннектором Carcon, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
128. Катетер аспирационный Elephant с коннектором Carcon, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
129. Катетер аспирационный Elephant с коннектором Carcon, размер CH/FR 14 (4,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
130. Катетер аспирационный Elephant с коннектором Carcon, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
131. Катетер аспирационный Elephant с коннектором Carcon, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
132. Катетер аспирационный Elephant с коннектором Carcon, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный Elephant с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
133. Катетер аспирационный изогнутый с прямым коннектором, размер CH/FR 6 (2мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный изогнутый с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
134. Катетер аспирационный изогнутый с прямым коннектором, размер CH/FR 8 (2,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный изогнутый с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
135. Катетер аспирационный изогнутый с прямым коннектором, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный изогнутый с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
136. Катетер аспирационный изогнутый с прямым коннектором, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный изогнутый с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
137. Катетер аспирационный изогнутый с прямым коннектором, размер CH/FR 14 (4,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный изогнутый с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
138. Катетер аспирационный изогнутый с прямым коннектором, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный изогнутый с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
139. Катетер аспирационный изогнутый с прямым коннектором, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный изогнутый с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
140. Катетер аспирационный изогнутый с прямым коннектором, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный изогнутый с прямым коннектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
141. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 6 (2мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный изогнутый с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
142. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 8 (2,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный изогнутый с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
143. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный изогнутый с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
144. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный изогнутый с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
145. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 14 (4,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный изогнутый с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
146. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный изогнутый с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;

- индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 147. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный изогнутый с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 148. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный изогнутый с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 149. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 6 (2мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный изогнутый с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 150. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 8 (2,67мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный изогнутый с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 151. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный изогнутый с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 152. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный изогнутый с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 153. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 14 (4,67мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный изогнутый с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 154. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный изогнутый с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 155. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный изогнутый с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 156. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в составе:
 - катетер аспирационный изогнутый с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- 157. Катетер аспирационный изогнутый с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR

6 (2мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный изогнутый с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

158. Катетер аспирационный изогнутый с прозрачным коннектором Y-Vacop, размер CH/FR 8 (2.67мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный изогнутый с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

159. Катетер аспирационный изогнутый с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный изогнутый с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

160. Катетер аспирационный изогнутый с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный изогнутый с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

161. Катетер аспирационный изогнутый с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 14 (4,67мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный изогнутый с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

162. Катетер аспирационный изогнутый с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный изогнутый с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

163. Катетер аспирационный изогнутый с прозрачным коннектором Y-Vacop, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный изогнутый с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

164. Катетер аспирационный изогнутый с прозрачным коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный изогнутый с прозрачным коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

165. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором Carson, размер CH/FR 6 (2мм х 500мм) в составе:

- катетер аспирационный изогнутый с коннектором Carson – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

166. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором Карсон, размер CH/FR 8 (2,67мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный изогнутый с коннектором Сарсон – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

167. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором Carcon, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный изогнутый с коннектором Carson – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
168. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором Carcon, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный изогнутый с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
169. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором Carcon, размер CH/FR 14 (4,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный изогнутый с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
170. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором Carcon, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный изогнутый с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
171. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором Carcon, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный изогнутый с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
172. Катетер аспирационный изогнутый с коннектором Carcon, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный изогнутый с коннектором Carcon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
173. Катетер аспирационный LoFri с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 6 (2мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный LoFri с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
174. Катетер аспирационный LoFri с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 8 (2,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный LoFri с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
175. Катетер аспирационный LoFri с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный LoFri с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
176. Катетер аспирационный LoFri с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный LoFri с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
177. Катетер аспирационный LoFri с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 14 (4,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный LoFri с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;

178. Катетер аспирационный LoFri с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный LoFri с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
179. Катетер аспирационный LoFri с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный LoFri с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
180. Катетер аспирационный LoFri с коннектором T-Vacon, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный LoFri с коннектором T-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
181. Катетер аспирационный LoFri с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 6 (2мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный LoFri с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
182. Катетер аспирационный LoFri с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 8 (2,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный LoFri с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
183. Катетер аспирационный LoFri с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 10 (3,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный LoFri с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
184. Катетер аспирационный LoFri с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 12 (4мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный LoFri с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
185. Катетер аспирационный LoFri с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 14 (4,67мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный LoFri с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
186. Катетер аспирационный LoFri с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 16 (5,33мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный LoFri с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
187. Катетер аспирационный LoFri с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 18 (6мм x 500мм) в составе:
- катетер аспирационный LoFri с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
188. Катетер аспирационный LoFri с коннектором Y-Vacon, размер CH/FR 20 (6,67мм x 500мм) в составе:

- катетер аспирационный LoFri с коннектором Y-Vacon – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
189. Катетер аспирационный с коннектором Carson с коллектором, размер CH/FR 5 (1,67мм х 500мм) в составе:
- катетер аспирационный с коннектором Carson с коллектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
190. Катетер аспирационный с коннектором Carson с коллектором, размер CH/FR 6 (2мм х 500мм) в составе:
- катетер аспирационный с коннектором Carson с коллектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
191. Катетер аспирационный с коннектором Carson с коллектором, размер CH/FR 8 (2,67мм х 500мм) в составе:
- катетер аспирационный с коннектором Carson с коллектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
192. Катетер аспирационный с коннектором Carson с коллектором, размер CH/FR 10 (3,33мм х 500мм) в составе:
- катетер аспирационный с коннектором Carson с коллектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
193. Катетер аспирационный с коннектором Carson с коллектором, размер CH/FR 12 (4мм х 500мм) в составе:
- катетер аспирационный с коннектором Carson с коллектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
194. Катетер аспирационный с коннектором Carson с коллектором, размер CH/FR 14 (4,67мм х 500мм) в составе:
- катетер аспирационный с коннектором Carson с коллектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
195. Катетер аспирационный с коннектором Carson с коллектором, размер CH/FR 16 (5,33мм х 500мм) в составе:
- катетер аспирационный с коннектором Carson с коллектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
196. Катетер аспирационный с коннектором Carson с коллектором, размер CH/FR J8 (6мм х 500мм) в составе:
- катетер аспирационный с коннектором Carson с коллектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
197. Катетер аспирационный с коннектором Carson с коллектором, размер CH/FR 20 (6,67мм х 500мм) в составе:
- катетер аспирационный с коннектором Carson с коллектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.;
198. Катетер аспирационный с коннектором Carson с коллектором, размер CH/FR 22 (7,3мм х 500мм) в составе:
- катетер аспирационный с коннектором Carson с коллектором – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;

2 НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА

Производитель:

Apexmed International B.V.,
(Апексмед Интернэшнл Б.В.);
Keizersgracht 62-64, 1015CS Amsterdam, The Netherlands
(Кайзерсграхт 62-64, 1015 CS г. Амстердам, Нидерланды);

Место производства:

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.,
(Нинбо Грейткае Трейдинг Ко., Лтд.)
Unit 93, Building 12, № 818, Qiming Road, Yinzhou 315105, Ningbo, Zheijang, China

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- Катетер аспирационный – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

4 ДАННЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Назначение.

Катетер аспирационный используется для отсасывания секрета, мокроты и других жидкостей в верхних и нижних дыхательных путях. Катетер вводится непосредственно в трахею или с помощью вставленной эндотрахеальной и трахеостомической трубок для анестезии.

Показания к применению.

- Для эвакуации скопившегося в дыхательных путях, ротовой и носовой полостей секрета;
- Для отсасывания скопившейся в дыхательных путях, ротовой и носовой полостей мокроты;
- Для эвакуации патологического содержимого (крови, гнойного отделяемого) у пациентов, которым проводится длительная искусственная вентиляция легких;

Противопоказания.

- необъяснимое кровохарканье
- тяжелые коагулопатии
- сильный бронхоспазм
- гортанный стридор
- перелом основания черепа
- гемодинамическая нестабильность
- индивидуальная непереносимость материалов изделия

Возможные побочные действия и осложнения.

- асфиксия
- аспирация
- ателектаз
- бронхоспазм
- остановка сердца
- нарушения сердечного ритма
- отек
- гиперемия
- гипоксия
- спазм гортани
- кровоизлияние в слизистую оболочку
- изъязвление слизистой оболочки
- кровотечение или кровотечение из дыхательных путей
- инфекция дыхательных путей
- травма слизистой оболочки трахеи/бронхов.

Меры предосторожности при применении.

- Не используйте изделие, если упаковка была открыта или повреждена.
- Прочтите все предупреждения и инструкции перед использованием, неправильное использование может привести к серьезному или смертельному заболеванию или травме.
- Производите все манипуляции с катетером исключительно в перчатках.
- При выборе катетера подходящего размера для каждого отдельного пациента следует использовать экспертную клиническую оценку.
- Не прикладывайте усилия к катетеру, если во время интубации возникнет какая-либо преграда.
- Отсасывание - болезненный процесс, пациенты должны быть проинформированы перед отсасыванием и психологически подготовлены.
- Пациентам следует дать 100% кислород перед отсасыванием в течение не менее 30 секунд, чтобы увеличить запасы кислорода и снизить вероятность гипоксемии во время отсасывания.
- Наблюдайте за состоянием болезни пациентов во время отсасывания, при любых значительных изменениях, таких как частота сердечных сокращений, артериальное давление, дыхание или насыщение крови кислородом, следует немедленно прекратить отсасывание и дать чистый кислород.
- Не использовать изделие по истечении срока годности.
- Это одноразовое изделие для одноразового использования, любая повторная стерилизация или повторное использование изделия может быть опасно для жизни и здоровья пациента.
- Утилизация аспирационных катетеров должна производиться в соответствии с применимыми национальными правилами по биологическим опасным отходам.

Область применения.

Катетеры аспирационные предназначены для индивидуального применения в медицинских учреждениях в отделениях хирургии, анестезиологии, реанимации квалифицированным медицинским и сестринским персоналом.

Требования безопасности.

Не используйте изделие при повреждении стерильности или при любом повреждении упаковки.

Катетеры аспирационные APExMED – медицинские изделия однократного применения, не подлежат повторному использованию. «Apexmed International B.V.», the Netherlands («Апексмед Интернэшнл Б.В.»), Нидерланды не несет ответственности за осложнения, которые могут возникнуть в результате многократного или неправильного использования изделия. Не используйте изделие без перчаток.

Не используйте изделие после истечения срока годности.

Придерживайтесь национальных стандартов при утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

5 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура: от -30°C до + 35°C.

Относительная влажность воздуха до 96 %.

Атмосферное давление 500 гПа до 1060 гПа.

Хранение производится в чистых, отапливаемых, сухих помещениях, вдали от источников тепла при температуре от +5°C до +35 °C, и относительной влажности воздуха не более 80%. Следует защищать продукцию от влаги и чрезмерного нагрева. Хранить таким образом, чтобы избежать деформации изделия или повреждения упаковки.

Срок хранения - 5 лет с момента изготовления

Температура эксплуатации: от + 10°C до + 35°C

Относительная влажность воздуха от 20% до 85%

Атмосферное давление 700 гПа до 1060 гПа

Катетеры аспирационные APExMED предназначены для индивидуального применения в медицинских учреждениях в отделениях хирургии, анестезиологии, реанимации квалифицированным медицинским и сестринским персоналом.

Рекомендуется защищать катетеры от воздействия экстремально низких температур и резких перепадов температуры.

6 СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Катетеры аспирационные APExMED - это изделия одноразового использования, которые поставляются стерильными. Метод стерилизации – оксидом этилена, повторной стерилизации не подлежат. Срок сохранения стерильности указан на упаковке и составляет 5 лет.

7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Катетер аспирационный представляет собой полую трубку (тело катетера), которую вводят в трахею или с помощью вставленной эндотрахеальной и трахеостомической трубок для анестезии, с коннектором, имеющим разные цветовые кодировки, с помощью которых можно правильно подобрать необходимый размер.

Катетеры аспирационные - это стерильные одноразовые изделия, которые применяются для индивидуального применения в медицинских учреждениях в отделениях хирургии, анестезиологии, реанимации квалифицированным медицинским и сестринским персоналом. Катетеры аспирационные APEXMED стерилизованы оксидом этилена.

Порядок работы для Катетеры аспирационные APEXMED, в вариантах исполнения:

- Подберите необходимый размер и вид катетера аспирационного для проведения санации трахео-бронхиального дерева пациента. Цветовая кодировка эндотрахеальной или трахеостомической трубки должна соответствовать цветовой кодировке катетера, что позволит подобрать катетер в строгом соответствии с внутренним диаметром трубки;
- Проверьте упаковку катетера на герметичность и срок годности;
- Работайте в перчатках.
- Недопустимо попадание на катетер грязи или каких-либо посторонних веществ с ваших рук, т.к. во время введения любые вещества попадут в организм вместе с ней;
- Снимите упаковку и выньте катетер;
- Присоедините катетер к стационарному источнику вакуума;
- Осторожно введите катетер в дыхательные пути пациента через установленную эндотрахеальную или трахеостомическую трубку;
- Используйте сантиметровую маркировку длины катетера (при наличии) для контроля глубины его введения и правильности размещения. Будьте внимательны при введении катетера пациенту, т.к. слишком глубокое введение катетера аспирационного сопровождается угрозой ятрогенной перфорации бронха и пневмоторакса;
- Проведите санацию дыхательных путей пациента. Отрегулируйте давление и управляйте частотой дыхательных движений;
- Контролируйте давление всасывания, путём прерывистой аспирации, зажимая отверстие на коннекторе пальцем (при наличии такого коннектора);
- Извлеките катетер вытягивающим движением по окончании процедуры.

Способ (метод) применения

Катетер аспирационный должен применяться медицинским работником в условиях ЛПУ.

Средства и методы дезинфекции и очистки

Катетеры аспирационные APEXMED являются одноразовыми стерильными изделиями, методам дезинфекции и отчистки не подлежат.

Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия

Квалифицированный медицинский и сестринский персонал.


8 УПАКОВКА

Изделие упаковывается по штучно в пакет (индивидуальная упаковка), который термически заварен. Пакет герметичен.

Индивидуальная упаковка:

Каждое изделие упаковано в индивидуальную упаковку. Каждая упаковка содержит одну единицу продукции.

Макет упаковки индивидуальной, схематическое изображение:¹

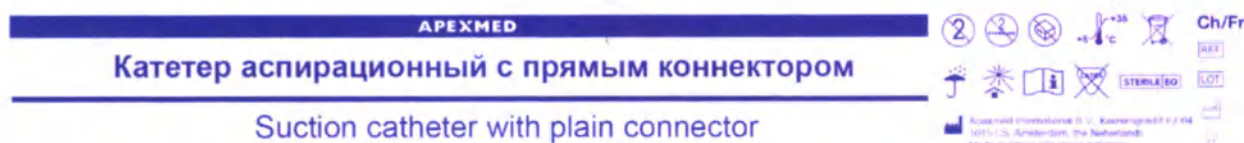

Пенал

50/100 шт. индивидуальных упаковок размещены внутри внутренней коробке – пенале.

Макет упаковки (пенал), схематическое изображение:²



Транспортная упаковка

200/1000 шт. коробок (пеналов) помещают в картонную коробку – транспортную упаковку.

Индивидуальная упаковка, групповая упаковка – не более 100 шт., транспортная коробка – не более 1000 шт.

¹ Окончательная версия индивидуальной упаковки определяется техническим заданием на производство.

² Окончательная версия упаковки (пенал) определяется техническим заданием на производство.

9 МАРКИРОВКА

На упаковку изделия может быть нанесена следующая информация:³

- наименование изделия
- размер
- адрес и наименование производителя
- номер партии
- дата изготовления
- дата истечения срока годности
- сведения о стерильности и методе стерилизации
- символы «запрет на повторное применение»
- «не стерилизовать повторно»
- «не использовать при повреждении упаковки»
- «утилизация по установленным правилам»
- «беречь от влаги»
- «не допускать воздействия солнечного света»
- «обратитесь к инструкции по применению»
- номер и дата регистрационного удостоверения
- указано, что медицинское изделие предназначено для однократного применения

Символы, встречающиеся на этикетке (упаковке) МИ – Катетеры аспирационные APXHMED:


На упаковку изделия нанесена следующая информация:

- название медицинского изделия;
- количество;
- наименование, адрес и логотип производителя;
- срок годности;
- номер серии;
- размер;
- другие информационные надписи.

Символы, встречающиеся на этикетке (упаковке) МИ

	Код партии
	Номер по каталогу
	Дата изготовления
	Использовать до
	Запрет на повторное применение
	Не стерилизовать повторно

³ Окончательная версия маркировки определяется техническим заданием на производство

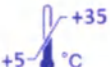	Утилизация по установленным правилам
	Не содержит латекс добавить
	Стерилизовано оксидом этилена
	Беречь от влаги
	Температурный диапазон поменять температурный диапазон
	Не допускать воздействия солнечного света
	Обратитесь к инструкции по применению
	Не использовать при повреждении упаковки
	Производитель
	Дата и номер РУ
	Знак сертификации (при необходимости)

10 СРОК ГОДНОСТИ

Хранение производится в чистых, отапливаемых, сухих помещениях, вдали от источников тепла при температуре от +5°C до +35 °C, и относительной влажности воздуха не более 80%. Следует защищать продукцию от влаги и чрезмерного нагрева. Хранить таким образом, чтобы избежать деформации изделия или повреждения упаковки.

Срок хранения - 5 лет с момента изготовления.

11 УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные Катетеры аспирационные должны быть утилизированы в соответствии с требованиями к утилизации медицинских отходов. Класс опасности медицинских отходов, исходя из характеристик морфологического состава- класс Б (эпидемиологически опасные отходы).

В целях защиты окружающей среды изделия подлежат утилизации отдельно от бытового мусора. Изделия с истёкшим сроком годности могут быть утилизированы в соответствии с требованиями к утилизации медицинских отходов.

Придерживайтесь национальных стандартов при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НАЗВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НА ПРИНЯТИЕ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

Компания производитель гарантирует работоспособность и сохранение стерильности изделий в течение всего срока годности при соблюдении условий хранения и герметичности

Уполномоченный представитель:

Общество с ограниченной ответственностью "Апексмед Рус"

Почтовый адрес - Россия, 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская д.24, стр. 1, ком. 606.

Юридический адрес - Россия, 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская д.24, стр. 1, ком. 606.

Телефон - 8-495-108-03-64,

Веб.сайт - apexmed.ru

e-mail - info@apexmed.ru, quality@apexmed.ru

ИНН - 7717777072

Производитель:

Apexmed International B.V., Апексмед Интернэшнл Б.В.

Keizersgracht 62-64, 1015CS Amsterdam, The Netherlands, Кайзерсграхт 62-64, 1015 CS г. Амстердам, Нидерланды

Место производства:

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd. (Нинбо Грейткае Трейдинг Ко., Лтд.), Unit 93, Building 12, № 818, Qiming Road, Yinzhou 315105, Ningbo, Zhejiang, China (Блок 93, корпус №818, Киминг Роуд, Иньчжоу, 315105 Нинбо, Китай).

Рекламации

В случае возникновения претензий, по всем вопросам обращайтесь к уполномоченному представителю в Российской Федерации компании. Организация, уполномоченная производителем на принятие и удовлетворение требований от потребителей в отношении товара ненадлежащего качества:

Общество с ограниченной ответственностью «Апексмед Рус»

ООО «Апексмед Рус»

Почтовый адрес: 107023, Россия, г. Москва, Электrozаводская улица, дом 24 строение 1, комната 606

Юридический адрес: 107023, Россия, г. Москва, Электrozаводская улица, дом 24 строение 1, комната 606

Тел.: +7(495)108-03-64

www.apexmed.ru, info@apexmed.ru

ИНН 7717777072



Seen for authentication of the signature of:

- **R Biktogirov**

By me, mr. R.K. Soekhoe- Randhawa as assigned notary
of mr Henri Marc Francois Neve, civil law notary in Leiderdorp.

This authentication certifies the signature
of the above-mentioned person. However,
the undersigned does not accept any liability
with respect to the further contents of the
document. Leiderdorp, **March 30, 2023**



АПЕКСМЕД

Управляющий директор

Рашид Биктогиров

[Печать

Апексмед Интернэшнл Б.В.

Амстердам

Нидерланды]

Настоящим подтверждается подлинности подписи:

Р. Р. Биктогиров

Мной, г-ном Р.К. Соэкхо-Рандава (R.K. Soekhoe-Randhawa), нотариусом,
назначенным Генри Марком Франкоис Неве (mr. Henri Marc Francois Neve),
гражданским нотариусом в г. Лейдердорп.

Данным документом заверяется подпись
вышеуказанного лица. Однако нижеподписавшийся
не несет никакой ответственности за прочее содержание документа.

Лейдердорп (Нидерланды)

30 марта, 2023 г.

(подпись)

Официальная печать нотариуса

Генри Марком Франкоис Неве (mr. Henri Marc Francois Neve)

Р.К. Соэкхо-Рандава (R.K. Soekhoe-Randhawa)

Перевод с английского языка на русский выполнил переводчик Чечеткин Сергей Владимирович.

Чечеткин Сергей Владимирович

Российская Федерация

Город Москва

Тринадцатого апреля две тысячи двадцать третьего года

Я, Сахарчук Юлия Михайловна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Шараповой Екатерины Петровны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Чечеткина Сергея Владимировича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/1965-н/77-2023-5-828.

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Ю.М.Сахарчук



Прощнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 34 (тридцать четыре) листа.

Ю.М.Сахарчук