


Утверждаю
Генеральный директор ООО
«ТД Апекслаб»
 М.В. Оборотов

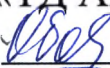

**Инструкция пользователя
изделия медицинского назначения**


**«Пробирки APXLAV для взятия, хранения, транспортировки
и анализа крови и биоматериалов разных размеров и объемов,
вакуумные и не вакуумные, с наполнителями и без»**

производства компании

**«Yancheng Huida Medical Instruments Co.Ltd.»
(Янченг Хуида Медикл Инструментс Ко., ООО)**

2011

Техника взятия крови при помощи вакуумной системы:

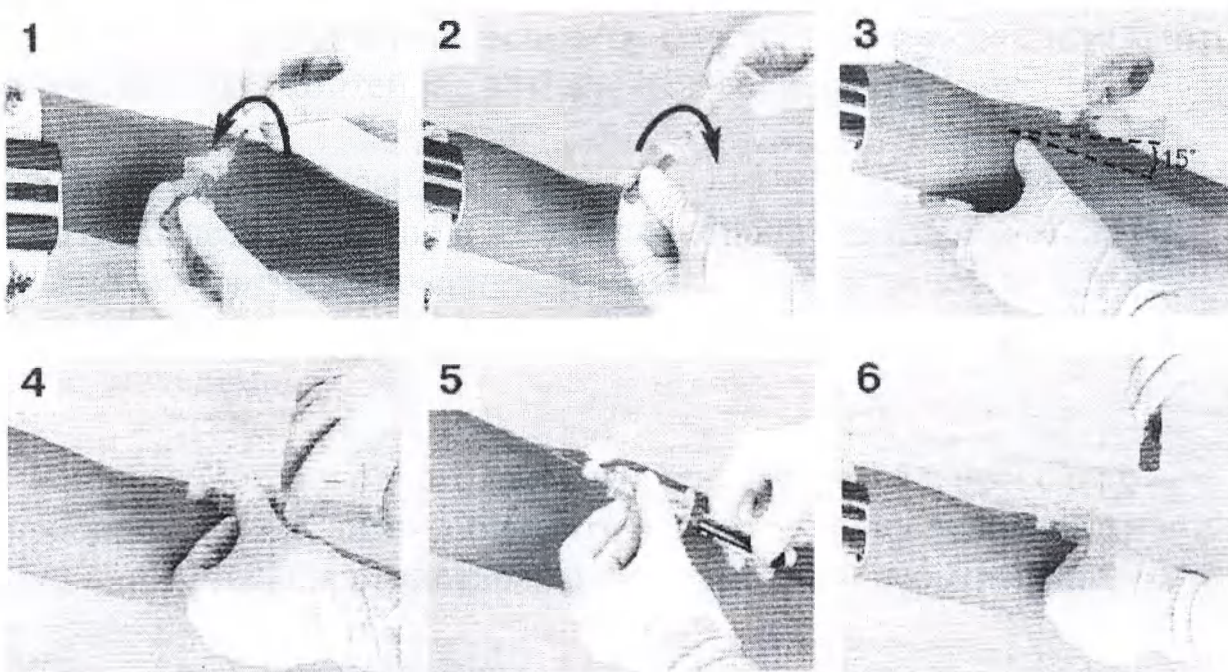

- Наложить жгут.
- Взять иглу левой рукой за цветной колпачок, правой рукой вывернуть и снять белый защитный колпачок.
- Ввернуть в держатель освободившийся конец иглы в резиновом чехле и завинтить до упора.
- Снять цветной защитный колпачок и ввести иглу в вену.
- Взять держатель левой рукой, а в правую руку взять пробирку и вставить ее крышкой в держатель.
- Удерживая выступы держателя указательным и средним пальцами правой руки, большим пальцем надеть пробирку на иглу до упора.
- Ослабить жгут.



После заполнения пробирки до необходимого объема извлечь ее из держателя.

Аккуратно перемешать содержимое заполненной пробирки, переворачивая ее необходимое число раз. Вставить в держатель следующую пробирку. Повторить действия, начиная с пункта №4.

После заполнения всех необходимых пробирок вынуть иглу с держателем из вены. Иглу или иглу вместе с держателем поместить в специальный контейнер для использованных игл.


Правило перемешивания:

Сразу после заполнения и извлечения пробирки из держателя ее нужно аккуратно перевернуть несколько раз (количество раз определяется типом наполнителя) на 180° для смешивания пробы с наполнителем.







В случае, когда у одного пациента кровь берется в несколько пробирок, необходимо соблюдать правильную последовательность их заполнения для предотвращения возможной перекрестной контаминации пробы.

Каждая пробирка содержит количество транспортной среды, строго определенное для указанного на ней объема крови. Пробирки должны заполняться в пределах $\pm 10\%$ от указанного объема (т.е. пробирка на 4,5 мл должна заполняться в объеме между 4 и 5 мл).

Техника взятия биоматериала при помощи пробирки с тампоном:

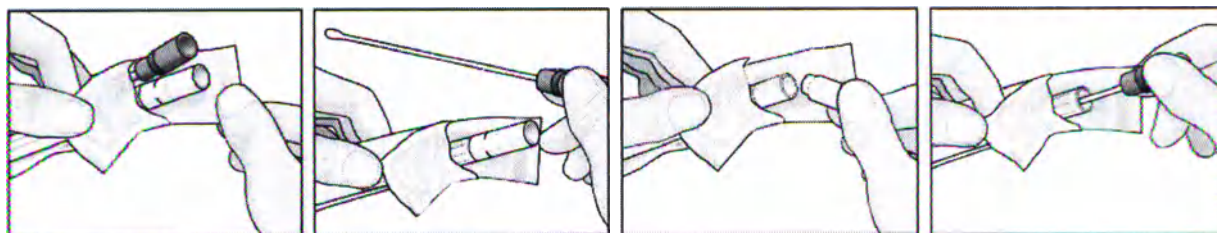

Для забора образца необходимо выполнить действия, показанные на рисунке выше.

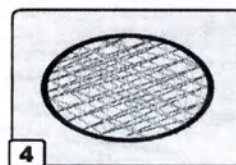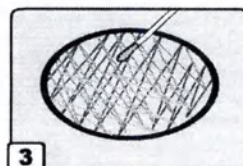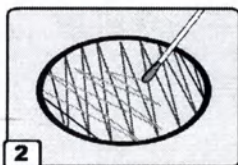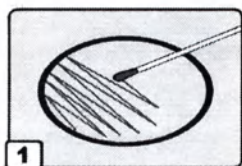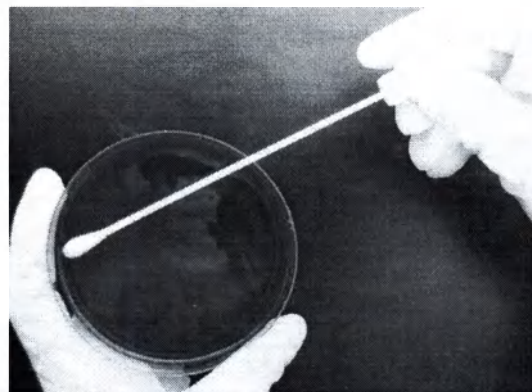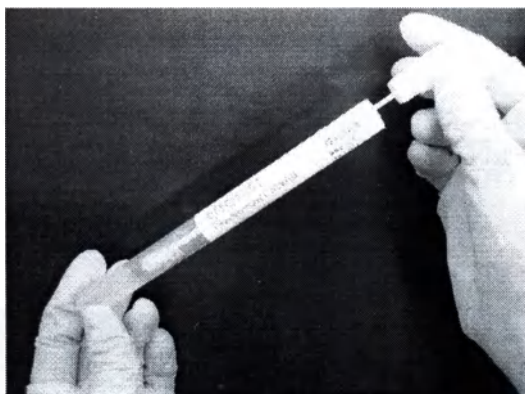

Для нанесения образца на лабораторную тару необходимо выполнить действия, показанные на рисунке выше.



проверено
принято
4 листа 20.05.11 М.В.з