

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Орто-Мастер»
(ООО «Орто-Мастер»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор



« ____ » _____ года

Памятка по пользованию изделием медицинского назначения:
Протез предплечья тяговый ПР2-31
(ТУ 9396-004-69861164-2011)

1 Назначение изделия

1.1 Протез предплечья тяговый ПР2-31 предназначен для предоставления пациентам с ампутационными дефектами верхних конечностей на уровне предплечья возможности самостоятельно выполнять действия, необходимые при самообслуживании, работе (за исключением тяжелых), отдыхе и обеспечивать частичное возмещение функционального и косметического дефекта.

2 Описание конструкции

2.1 Протез имеет модульную конструкцию, содержащую приемную гильзу, вкладной элемент, крепление протеза, тягу, активную кисть, косметическую оболочку.

2.2 Широкий выбор комплектующих позволяет изготавливать протез с учетом индивидуальных особенностей пациента в соответствии с медицинским назначением, учитывающим клинические, антропометрические, массо-инерционные и другие характеристики пациента, а также легко корректировать параметры сборки протеза при примерке и в процессе эксплуатации.

2.3 Для изготовления протеза используются материалы: слоистый пластик на основе композиции пропиточной «Акрилон-3» ТУ 2257-001-25558743-94 (гильза), Педилин 617S3 (вкладной элемент).

3 Надевание и пользование изделием

3.1 Нанести тальк на дистальную часть культи и надеть на нее шерстяной или хлопчатобумажный чехол. Для уменьшения трения культи в приемной гильзе во время эксплуатации рекомендуется надеть непосредственно на культю шерстяной или капроновый чехол.

3.2 Поместить культю в культеприемник до упора. Дать нагрузку, застегнуть крепление.

3.3 Проверить удобство размещения культи в приемной полости гильзы и надежность крепления протеза.

3.4 Управление хватом кисти осуществляется при помощи активного разгибания культи в локтевом суставе либо движением противоположного плеча. Хват осуществляется с помощью возвратной пружины кисти.

4 Уход за протезом

4.1 Протез необходимо оберегать от поломок и деформации отдельных элементов, предохранять от сырости.

4.2 Внутреннюю полость приемной гильзы не менее одного раза в неделю рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной нейтральным раствором моющих средств, с последующей просушкой.

4.3 После использования в дождливую погоду в случае, если протез промок, необходимо протереть протез и высушить.

4.4 Не следует хранить протез вблизи источника тепла, сушить при комнатной температуре в проветриваемом помещении.

4.5 Косметическую оболочку (перчатку) необходимо ежедневно смазывать защитным дневным кремом для рук (например, силиконовым) для создания тонкой защитной пленки на поверхности перчатки.

4.6 Для сохранения внешнего вида косметической перчатки необходимо избегать контакта косметической перчатки с печатной продукцией (газетами, книгами, журналами и т.д.), а также аккуратно пользоваться шариковыми ручками, так как эти загрязнения с косметической перчатки полностью не выводятся, а лишь обесцвечиваются.

5 Уход за культей

Ежедневно, после эксплуатации протеза, необходимо проводить общепринятую гигиеническую обработку кожных покровов культи, обмывание теплым мыльным раствором с последующим вытиранием насухо. После обмывания показан массаж культи, обработка кожи культи защитными питательными кремами и лосьонами.

6 Ремонт протеза

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу узлов протеза в течение девяти месяцев со дня выдачи при условии правильной эксплуатации.

6.2 Самостоятельная разборка и ремонт протеза запрещены.

6.3 При возникновении неполадок в протезе (появление люфтов, поломка кисти, облицовки протеза и др.) необходимо обратиться на протезно-ортопедическое предприятие, выдавшее протез.

1
Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью 4

(четыре)

листов.

Директор 

