

# ИНСТРУКЦИЯ

по применению шприцов одноразовых стерильных объемом 1, 2.5, 5, 10, 20, 30, 50 мл

## 1. Назначение

Шприцы одноразовые стерильные объемом 1, 2.5, 5, 10, 20, 30, 50 мл предназначены для инъекций с лечебно-диагностической целью

## 2. Основные технические характеристики

2.1 Шприцы одноразовые стерильные объемом 2.5, 5, 10, 20, 30, 50 мл

2.1.1 Двойная заточка иглы, размер G 18x38 мм

2.1.2 Коннектор «Луер-Лок»

2.1.3 Трехконтактный уплотнитель на поршне

2.1.4 Контрастная, несмываемая шкала шприца

Шприц инсулин-туберкулиновый 1 мл

2.5 Двойная шкала: инсулиновая – 100 МЕ (цена деления 1 ед.), туберкулиновая – 1,0 мл (цена деления 0,01 мл)

2.6 Цветной поршень с двухконтактным удлиненным уплотнителем

2.7 Двойная заточка иглы, размер G 27x 12,5 мм

2.8 Контрастная, несмываемая шкала шприца

## 3. Подготовка и порядок работы изделия

- внимательно изучить инструкцию
- вскрыть индивидуальную упаковку
- соблюдая условия асептики снять защитный колпачок с иглы
- заполнить емкость шприца препаратом в необходимой дозировке

**ВНИМАНИЕ!** Дозировку конкретного препарата рассчитывать строго в соответствии с предназначением соответствующей шкалы шприца. Учитывать, что инсулиновая шкала рассчитана на 100 МЕ. **Не путать со шкалой 40 МЕ!!!**

## 4. Правила хранения и использования

- 5.1. Изделия должны храниться при температуре от - 30 до +45 °С и относительной влажности от 30% до 85 %, в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей и влаги.
- 5.2. Перед применением изделия необходимо убедиться в целостности стерильной упаковки. Не применять при нарушенной упаковке и истечении срока годности.
- 5.3. Шприц является изделием однократного применения и подлежит утилизации после применения.
- 5.4 Утилизация и обработка шприца согласно ОСТа 42-21-2-81

Коммерческий директор  
ООО «МЕДИКОМ»



С. Н. Савосько