

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Полынцев Д.Г.

20 23 г.



Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для контроля качества анализа**

**«Контроли MagnoLIA РЭА», по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022»,**

**производства ООО «Компания Алкор Био»**

«Набор реагентов для контроля качества анализа  
«Контроли MagnoLIA РЭА», по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022»

Макет этикеток



## Вариант исполнения 1

Кат. № 1320201

На коробку:

виневениди оончленноисрефоди вит  
оиневоечлоизи х овоого



Контроли MagnoLIA РЭА  
Набор реагентов для контроля  
качества анализа  
«Контроли MagnoLIA РЭА»,  
по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022

Состав набора

|            |       |
|------------|-------|
| Контроль 1 | 1 фл. |
| Контроль 2 | 1 фл. |

LOT E003 2022-07-21 2023-07-21

REF 1320201


IVD

ТУ 21.20.23-635-98539446-2022  
РУ №XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,  
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Железнодорожный пр., д. 40, лит А  
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162  
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

Контроли  
MagnoLIA  
РЭА  
Контроль 1  
объем 0,5 мл  
+2<sup>8</sup>°C  
000 "Компания Алкор Био"

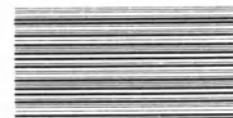

Контроли  
MagnoLIA  
РЭА  
Контроль 2  
объем 0,5 мл  
+2<sup>8</sup>°C  
000 "Компания Алкор Био"



«Набор реагентов для контроля качества анализа  
«Контроли MagnoLIA РЭА», по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ  
**АЛКОР БИО**

## Вариант исполнения 2

Кат. № 1320205

На коробку:



ООО «Компания Алкор Био»,  
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Железнодорожный пр., д. 40, лит А  
тел./факс: +7(812)6778779, 6772162  
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

**Контроли MagnoLIA РЭА**

**LOT** E003

**REF** 1320205

**IVD**

2023-07-21

+2/+8 °C



**MagnoLIA**

Состав набора:

|            |       |
|------------|-------|
| Контроль 1 | 5 фл. |
| Контроль 2 | 5 фл. |

ТУ 21.20.23-635-98539446-2022  
РУ № XXXXXXXXXXXXX

**Контроли MagnoLIA РЭА**

Набор реагентов для контроля качества анализа  
«Контроли MagnoLIA РЭА», по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022

**LOT** E003

**REF** 1320205

**IVD**

2022-07-21

2023-07-21

100

+2/+8 °C

Биобезопасность

Информация

Предупреждение

Готово к использованию  
Для профессионального применения




На флаконы:

Контроли  
MagnoLIA  
РЭА  
Контроль 1  
объем 0,5 мл

+2/+8 °C

ООО «Компания Алкор Био»

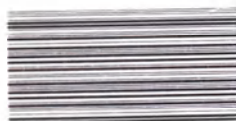


-5 шт.

Контроли  
MagnoLIA  
РЭА  
Контроль 2  
объем 0,5 мл

+2/+8 °C

ООО «Компания Алкор Био»

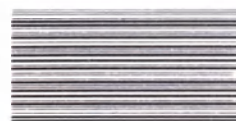

-5 шт.

«Набор реагентов для контроля качества анализа  
«Контроли MagnoLIA РЭА», по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022»

Макет этикеток



### Вариант исполнения 3

Кат. № 1320210

На коробку:



**Контроли MagnoLIA РЭА**

Состав набора:

|            |        |
|------------|--------|
| Контроль 1 | 10 фл. |
| Контроль 2 | 10 фл. |

ТУ 21.20.23-635-98539446-2022  
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

**Контроли MagnoLIA РЭА**  
Набор реагентов для контроля качества анализа  
«Контроли MagnoLIA РЭА», по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022

LOT E003  
REF 1320210  
IVD

2022-07-21  
2023-07-21  
200

+2<sup>+</sup>8 °C  
+2<sup>+</sup>8 °C  
!

Биологическая опасность



Готово к использованию.  
Для профессионального применения.

На флаконы:

Контроли  
MagnoLIA  
РЭА  
Контроль 1  
объем 0,5 мл  
+2<sup>+</sup>8 °C  
Биологическая опасность  
ООО «Компания Алкор Био»



- 10 шт.

Контроли  
MagnoLIA  
РЭА  
Контроль 2  
объем 0,5 мл  
+2<sup>+</sup>8 °C  
Биологическая опасность  
ООО «Компания Алкор Био»



- 10 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

4 ( четыре ) лист а

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.А. Полынцев



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Полынцев Д.Г.

20 23 г.



Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для контроля качества анализа**

**«Контроли MagnoLIA РЭА», по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022»,**


**производства ООО «Компания Алкор Био»**

ООО «Компания Алкор Био»  
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
Телефон/факс: (812) 677-87-79

**ПАСПОРТ № E003**

Набор реагентов для контроля качества анализа  
«Контроли MagnoLIA РЭА», по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022

Кат. № 1320201 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

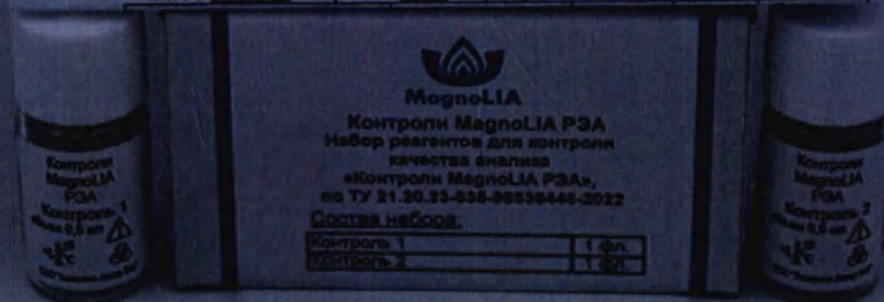

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*  
«Набор реагентов для контроля качества анализа  
«Контроли MagnoLIA РЭА», по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022»

ООО «Компания Алкор Био»  
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
Телефон/факс: (812) 677-87-79

**П А С П О Р Т № E003**

Набор реагентов для контроля качества анализа  
«Контроли MagnoLIA РЗА», по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022


Кат. № 1320201 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



|     |         |  |            |  |  |
|-----|---------|--|------------|--|--|
| LOT | E003    |  | 2022-07-21 |  |  |
| REF | 1320201 |  | 2023-07-21 |  |  |
| IVD |         |  | 20         |  |  |

ТУ 21.20.23-635-98539446-2022  
РУ №XXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,  
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Железнодорожный пр., д. 40, лит А  
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162  
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

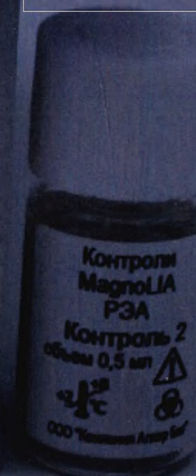


ООО «Компания Алкор Био»  
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
Телефон/факс: (812) 677-87-79


**ПАСПОРТ № E003**

Набор реагентов для контроля качества анализа  
«Контроли MagnoLIA РЭА», по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022

Кат. № 1320201 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

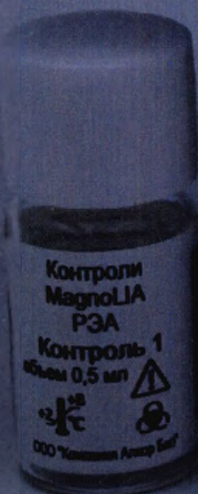

Готово к использованию.  
Для профессионального применения.

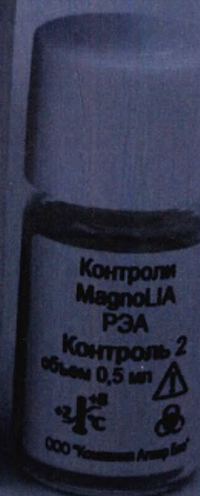

ООО «Компания Алкор Био»  
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа  
«Контроли MagnoLIA РЭА», по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022

Кат. № 1320205 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



Состав набора:

|            |       |
|------------|-------|
| Контроль 1 | 3 фл. |
| Контроль 2 | 3 фл. |

ТУ 21.20.23-635-98539446-2022  
Р/У № 10000000000000

LOT E003

REF 1320205

IVD

2022-07-21

2023-07-21



Генерал и компания  
для профессионального применения

Контроли MagnoLIA РЭА

Набор реагентов для контроля качества анализа  
«Контроли MagnoLIA РЭА», по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики *in vitro*

«Набор реагентов для контроля качества анализа


«Контроли MagnoLIA РЭА», по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022»

ООО «Компания Алкор Био»  
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа  
«Контроли MagnoLIA РЭА», по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022

Кат. № 1320205 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.


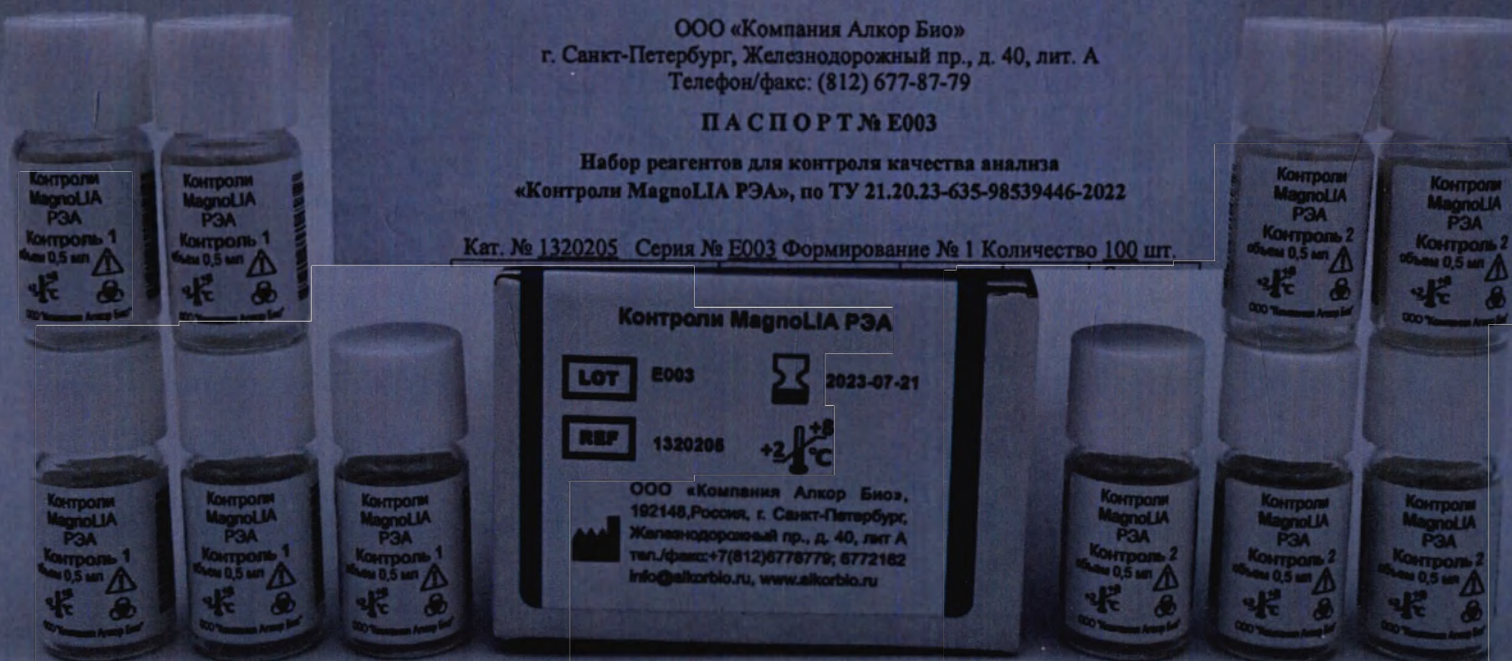


ООО «Компания Алкор Био»  
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа  
«Контроли MagnoLIA РЭА», по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022

Кат. № 1320205 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

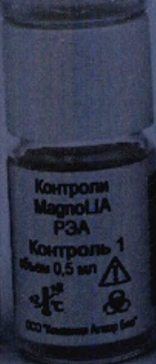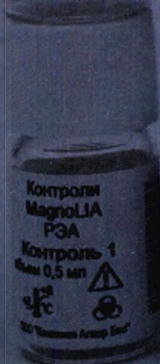

ООО «Компания Алкор Био»  
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа  
«Контроли MagnoLIA РЭА», по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022

Кат. № 1320210 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



**Контроли MagnoLIA РЭА**  
Набор реагентов для контроля качества анализа  
«Контроли MagnoLIA РЭА», по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022

Состав набора:

|            |        |
|------------|--------|
| Контроль 1 | 10 фл. |
| Контроль 2 | 10 фл. |

LOT E003

2023-07-21



REF 1320210

2023-07-21



IVB



ТУ 21.20.23-635-98539446-2022  
РУ № XXXXXXXXXX

Готово к использованию.  
Для профессионального применения.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*  
«Набор реагентов для контроля качества анализа  
«Контроли MagnoLIA РЭА», по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022»

ООО «Компания Алкор Био»  
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа  
«Контроли Magnolia P3A», по ТУ 21.20.13-635-98539446-2022

Кат. № 1320210 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Контроли Magnolia P3A

LOT E003

2023-07-31

РЭП 1320210



ООО «Компания Алкор Био»,  
182146, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
т/ф: (812) 677-87-79; 677-2162  
info@alcorbio.ru, www.alcorbio.ru




ООО «Компания Алкор Био»  
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
Телефон/факс: (812) 677-87-79


ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа  
«Контроли Magnolia РЭА», по ТУ 21.20.23-635-98539446-2022

Кат. № 1320210 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



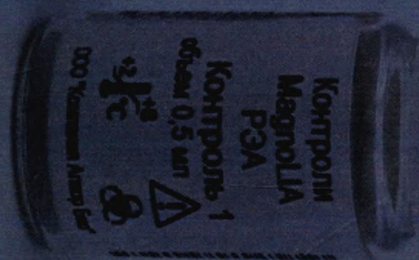

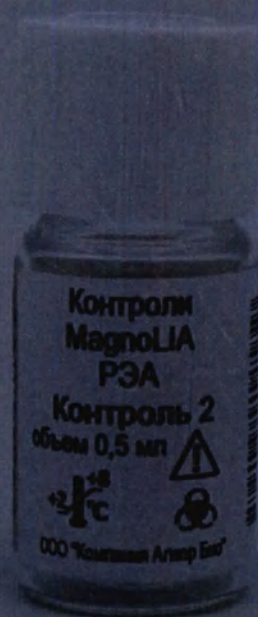

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

12 ( двадцать ) лист 8

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев

