

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Полынцев Д.Г.

2022 г.



Макеты этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
ВПГ 1,2 IgM», по ТУ 21.20.23-588-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1

Кат. № 2630101

На коробку:

винненәйиди олончявноиссәфорди килд
оинавәсәчәлэци к овозот



Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgM
Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgM»,
по ТУ 21.20.23-588-98539446-2022

Состав набора:

Калибратор -	1 фл.
Калибратор +	1 фл.

LOT E002  2022-03-22  +2⁰°C 

REF 2630101  2023-03-22 


IVD  10 

Антитела к Вич 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
ТУ 21.20.23-588-98539446-2022
RU NAXXXXXXXXXXXXX


 ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

Калибраторы
MagnoLIA
ВПГ 1,2 IgM
Калибратор +
объем 1 мл
 +2⁰°C 
ООО «Компания Алкор Био»

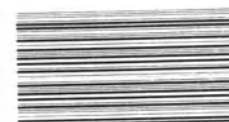

Калибраторы
MagnoLIA
ВПГ 1,2 IgM
Калибратор -
объем 1 мл
 +2⁰°C 
ООО «Компания Алкор Био»

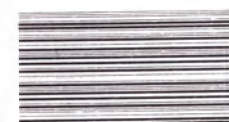

«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgM»,
по ТУ 21.20.23-588-98539446-2022»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 2630105

На коробку:

000 «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)678779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

REF 2630105

LOT E002

2023-03-22

+2⁺8
°C

Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgM

Состав набора:

Калибратор -	5 фл.
Калибратор +	5 фл.

ТУ 21.20.23-588-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXXXXX

Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgM
Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgM», по ТУ 21.20.23-588-98539446-2022

LOT E002

REF 2630105

IVD

2022-03-22

2023-03-22

50

+2⁺8
°C

Биологическая опасность

Информация

Предупреждение

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

На флаконы:

Калибраторы
MagnoLIA
ВПГ 1,2 IgM
Калибратор +
объем 1 мл

+2⁺8
°C

000 «Компания Алкор Био»



-5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
ВПГ 1,2 IgM
Калибратор -
объем 1 мл

+2⁺8
°C

000 «Компания Алкор Био»



-5 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (777) лист 9

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г.
20 22 г.



Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
ВПГ 1,2 IgM», по ТУ 21.20.23-588-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**




ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgM»,
по ТУ 21.20.23-588-98539446-2022

Кат. № 2630101 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

	Номинальное	С	Соответствие
--	-------------	---	--------------

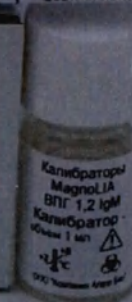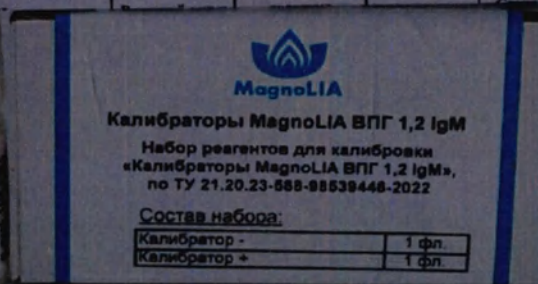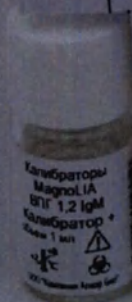

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
ВПГ 1,2 IgM», по ТУ 21.20.23-588-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E002

**Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgM»,
по ТУ 21.20.23-588-98539446-2022**

Кат. № 2630101 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Номинальное	
LOT E002	 2022-03-22
REF 2630101	 2023-03-22
IVD	 10

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
ТУ 21 20 23-588-98539446-2022
РУ №XXXXXXXXXXXXXX

 **ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru**

Калибраторы
MagnoLIA
ВПГ 1,2 IgM
Калибратор +
объем 1 мл



Калибраторы
MagnoLIA
ВПГ 1,2 IgM
Калибратор -
объем 1 мл

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

**Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgM»,
по ТУ 21.20.23-588-98539446-2022**

Кат. № 2630101 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

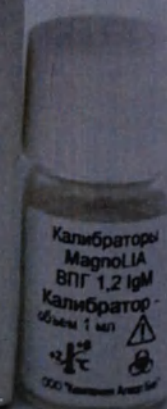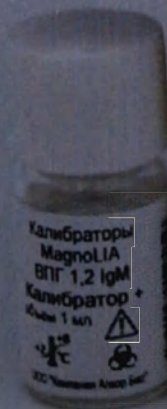

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgM»,
по ТУ 21.20.23-588-98539446-2022

Кат. № 2630105 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgM

Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgM», по ТУ 21.20.23-588-98539446-2022



Состав набора

Калибратор -	5 фл.
Калибратор +	5 фл.

ТУ 21.20.23-588-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXX

LOT E002



2022-03-22

+38



REF 2630105



2023-03-22



IVD



Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
ВПГ 1,2 IgM», по ТУ 21.20.23-588-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgM»,
по ТУ 21.20.23-588-98539446-2022


Кат. № 2630105 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgM

LOT E002 2023-03-22

REF 2630105 +2⁸
°C

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

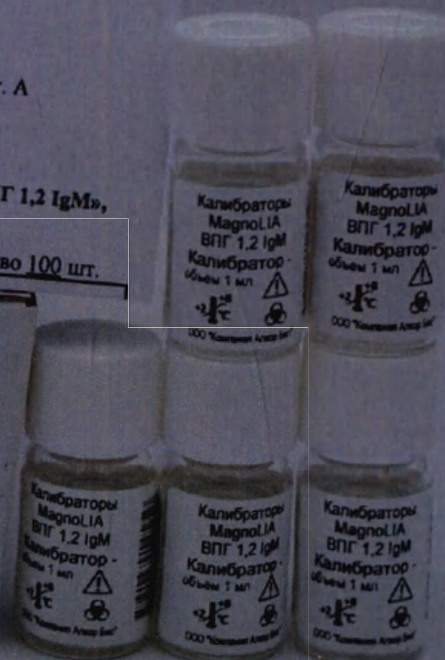


ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgM»,
по ТУ 21.20.23-588-98539446-2022

Кат. № 2630105 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Номинальное

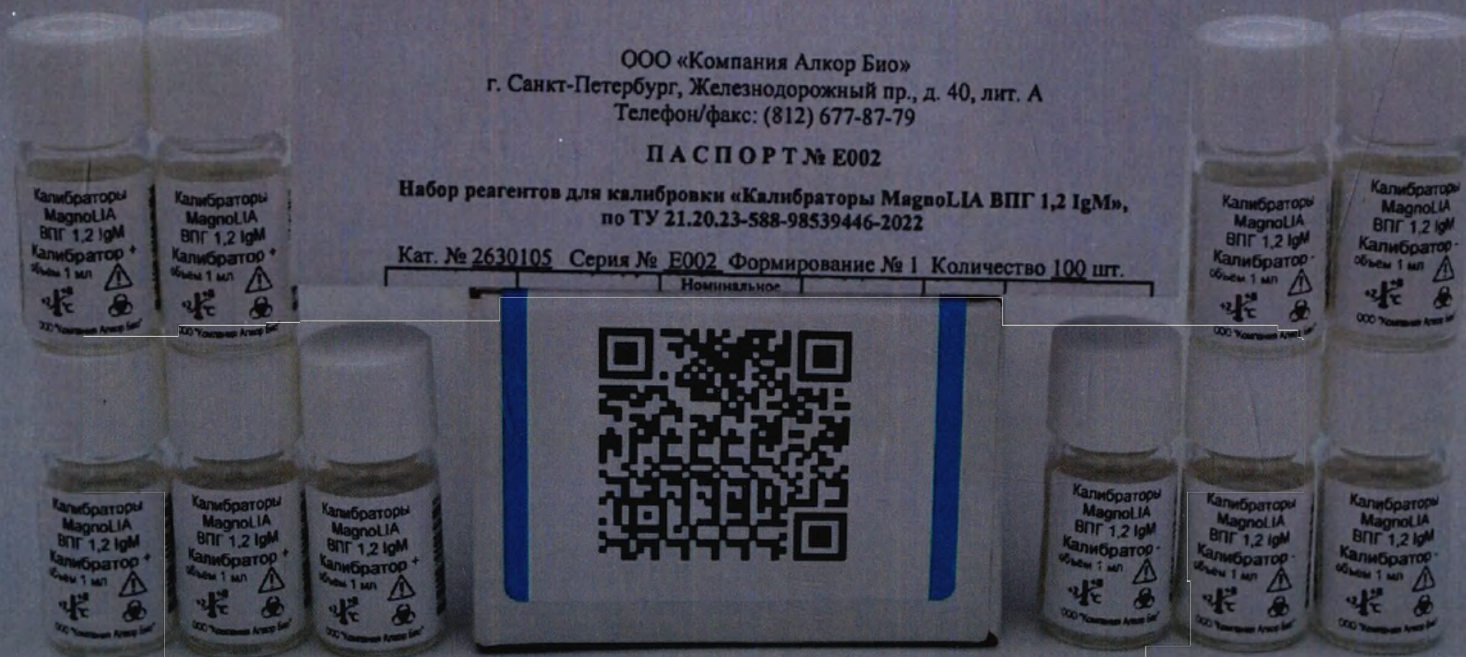

Калибраторы
MagnoLIA
ВПГ 1,2 IgM
Калибратор +
объем 1 мл

Калибраторы
MagnoLIA
ВПГ 1,2 IgM
Калибратор +
объем 1 мл

Калибраторы
MagnoLIA
ВПГ 1,2 IgM
Калибратор -
объем 1 мл

Калибраторы
MagnoLIA
ВПГ 1,2 IgM
Калибратор -
объем 1 мл

Калибраторы
MagnoLIA
ВПГ 1,2 IgM
Калибратор +
объем 1 мл


Калибраторы
MagnoLIA
ВПГ 1,2 IgM
Калибратор +
объем 1 мл


Калибраторы
MagnoLIA
ВПГ 1,2 IgM
Калибратор +
объем 1 мл

Калибраторы
MagnoLIA
ВПГ 1,2 IgM
Калибратор -
объем 1 мл

Калибраторы
MagnoLIA
ВПГ 1,2 IgM
Калибратор -
объем 1 мл

Калибраторы
MagnoLIA
ВПГ 1,2 IgM
Калибратор -
объем 1 мл

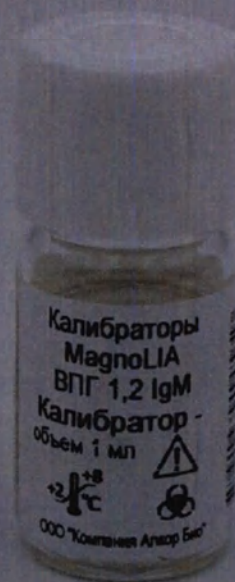

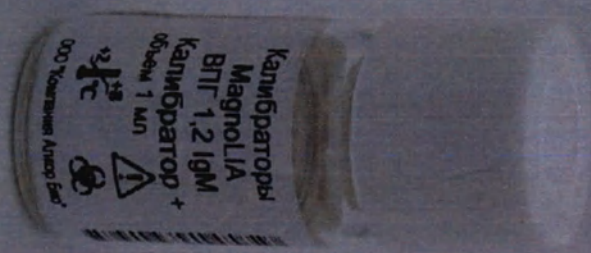

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

9 (99999) лист 8

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

_____ Д.Г. Полынцев

