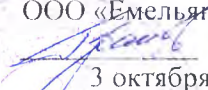


Утверждаю
Директор
ООО «Емельянь Савостинь»
 В.А. Губанов
3 октября 2017г.

Инструкция по медицинскому применению изделия медицинского назначения.

Название изделия медицинского назначения.

Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 8158-019-44881728-2016. Варианты исполнения 5м. х 5 см.; 5м. х 7 см.; 5м. х 10 см.; 7 м. х 7 см.; 7 м. х 10 см.; 7 м. х 14 см.; 10 м. х 10 см.; 10 м. х 16 см.

Сырьевой состав.

Бинты должны изготавливаться из медицинской отбеленной марли (100% хлопок) артикул 6498 производства ООО «Навтекс» по ТУ 9393-001-73213117-2010, размером 7м. х 14см. (длина 7 метров, ширина 14 сантиметров), толщина не более 25 мм., плотность 28 г/м², смачиваемость 5 с., капиллярность не менее 6,5 см., белизна 80 %, разрывная нагрузка 7,0 кгс, упакованные в полипропиленовую плёнку марки PP/PP по ТУ 2245-003-70378591-2011.

Основные параметры и характеристики.

Бинты формируются из роликов марли. Полученный бинт слегка спрессован и имеет прямоугольную форму. Предназначен для фиксации и наложения, а также для операционно-перевязочных средств для иммобилизации растяжений, вывихов, переломов, закрытых и открытых ран, ушибов, которые накладываются на части тела человека (голову, кисти рук, стопы ног, пальцы, суставы, и т.д.).

Область применения.

Применяется в медицинских учреждениях, в операционных залах, в салонах красоты, в быту.

Побочные действия.

Противопоказания: побочные действия не обнаружены. С лекарственными средствами не взаимодействует.

Условия транспортирования и хранения.

Транспортирование и хранение бинтов осуществляется по ГОСТ 7000. Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок. Условия транспортирования бинтов в части воздействия климатических факторов внешней среды – температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С и относительная влажность до 98 % при 25 °С (при этом колебания температуры и влажности воздуха внутри транспортного средства должны быть существенно меньше, чем на открытом воздухе).

Хранить в сухом, недоступном для детей месте, на поддонах или стеллажах при температуре не ниже -5 °С относительной влажности воздуха не более 80 %. Условия хранения бинтов в части воздействия климатических факторов внешней среды – температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 25 °С (в летнее время допускается до плюс 30 °С) и относительная влажность воздуха не более 80 %.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие бинтов требованиям ТУ 8158-019-44881728-2016 при соблюдении условий эксплуатации (указаний по применению), транспортирования и хранения.

Гарантийный срок годности стерильных бинтов – 5 лет с даты стерилизации. Применять не позднее срока годности.

Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.

Способ вскрытия: разорвите оболочку.

Сведения об утилизации.

После использования бинтов в быту упаковку и бинты следует выбросить в урну. В медицинских учреждениях утилизацию осуществлять в соответствии с Сан ПиН 2.1.7.2790.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью "Емельянь Савостинь. Ватная фабрика" (ООО «Емельянь Савостинь»). Юридический адрес: 391022, Россия, Рязанская область, Клепиковский район, с. Екшур. Телефон/факс (49142) 2-99-91. (49142) 2-43-40. E-mail: ides@list.ru.

Наименование нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие медицинского назначения ТУ 8158-019-44881728-2016 «Бинты марлевые медицинские. Технические условия».