

1025



DMG Elbgastraße 248 22547 Hamburg Germany

«APPROVE»

Head of Regulatory Affairs»

«DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH»

Dr. Ulrike Diekmann

подпись/signature

штамп/stamp



DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgastraße 248 • 22547 Hamburg • Germany
tel.: +49-40-241-1000 • www.dmg-dental.com

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

*Материал стоматологический наногибридный
композитный Ecosite Elements с принадлежностями, в
вариантах исполнения*



Elbgastraße 248
22547 Hamburg
Германия

Fon: +49 40 84006-0
Fax: +49 40 84006-222

info@dmg-dental.com
www.dmg-dental.com

Geschäftsführer:
Dr. Wolfgang Mühlbauer
Susanne Stegen

DMG Chemisch-Pharmaz. Fabrik GmbH
Handelsregister: HRB Hamburg 14 403

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

*Материал стоматологический наногибридный композитный
Ecosite Elements с принадлежностями, в вариантах
исполнения*

1. Наименование медицинского изделия

«Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements с принадлежностями» (Далее – Ecosite Elements или продукт).

Варианты исполнения:

1. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Pure:
- шприц (4 г) оттенок B1– 1 шт.
2. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Pure:
- шприц (4 г) оттенок A2– 1 шт.
3. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Pure:
- шприц (4 г) оттенок A3– 1 шт.
4. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Pure:
- шприц (4 г) оттенок A3.5– 1 шт.
5. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Pure:
- шприц (4 г) оттенок A4– 1 шт.
6. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Layer:
- шприц (4 г) оттенок EB– 1 шт.
7. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Layer:
- шприц (4 г) оттенок EL– 1 шт.
8. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Layer:
- шприц (4 г) оттенок EM– 1 шт.
9. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Layer:
- шприц (4 г) оттенок ED– 1 шт.
10. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Highlight:
- шприц (2 г) оттенок INC– 1 шт.,
11. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Highlight:
- шприц (2 г) оттенок OA2– 1 шт.,
12. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Highlight:
- шприц (2 г) оттенок W– 1 шт.,
13. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Highlight:
- шприц (2 г) оттенок B– 1 шт.,
14. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Pure:
- наконечник (0,25 г) оттенок B1– 16 шт.,
15. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Pure:
- наконечник (0,25 г) оттенок A2 – 16 шт.,
16. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Pure:
- наконечник (0,25 г) оттенок A3 – 16 шт.,
17. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Pure:
- наконечник (0,25 г) оттенок A3.5 – 16 шт.,
18. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Pure:
- наконечник (0,25 г) оттенок A4 – 16 шт.,
19. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Layer:
- наконечник (0,25 г) оттенок EB – 16 шт.,
20. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Layer:
- наконечник (0,25 г) оттенок EL – 16 шт.,
21. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Layer:
- наконечник (0,25 г) оттенок EM – 16 шт.,

22. Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements Layer:
- наконечник (0,25 г) оттенок ED – 16 шт.

С каждым вариантом исполнения поставляется инструкция по применению.

Принадлежности:

1. Диспенсер наконечников Safetip Dispenser Pro – 1 шт.
2. Наконечник с замком Luer-Lock – 50 шт./уп.
3. Вставка для ящика Ecosite Elements - 1 шт.
4. Расцветка Pure – 1 шт.
5. Расцветка Layer – 1 шт.

2. Производитель и уполномоченный представитель

2.1 Производитель

«ДМГ Химико-фармацевтическая фабрика ГмбХ»

(DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH)

Эльбгауштрассе 248, 22547 Гамбург, Германия

(Elbgaustraße 248, 22547 Hamburg, Germany)

Тел: +49 40 84 006-0

Факс: +49 40 84 006-222

E-mail: info@dmg-dental.com

<http://www.dmg-dental.com>

2.2 Уполномоченный представитель

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИСТРПРО» (ООО «РЕГИСТРПРО»)

125212, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Войковский, ул.

Адмирала Макарова, дом 6А, квартира 100

Тел: +7 (925) 506-46-17

E-mail: 5064617@mail.ru

3. Описание продукта

3.1 Принцип действия

Ecosite Elements - это светоотверждаемая, эстетичная, рентгеноконтрастная наногибридная композитная система для передней и задней зубной дуг. Линейка высоковязких композитов включает 5 оттенков VITA (B1, A2, A3, A3.5 и A4) и 4 варианта оттенка эмали (Enamel Bleach/Высветленный = EB, Enamel Light/Светлый = EL, Enamel Medium/Средний = EM и Enamel Dark/Темный = ED) различной степени прозрачности. В сочетании с их уникальной обработкой и отличными полировочными свойствами это способствует созданию высокоэстетичных реставраций.

Оттенки OA2 (Opak A2) и INC (Incisal) - это рентгеноконтрастные композиты с оптимальными характеристиками текучести. Оттенок OA2 рекомендуется для винирования слегка обесцвеченных участков и для создания окончательной непрозрачности зубов. Оттенок INC в особенности подходит для эстетического оформления режцового края благодаря высоким характеристикам прозрачности. Оба оттенка подходят для герметизации фиссур.

Оттенки W (White/белый) и B (Brown/коричневый) - это текучие композиты для индивидуализации композитных реставраций. Оттенок W используется для воспроизведения белых пятен и в качестве верхнего слоя. Оттенок B - идеальный выбор для фиссур и маскировки коричневых пятен.

Различные материалы и оттенки можно сгруппировать следующим образом:

Ecosite Elements Pure: 5 оттенков VITA B1, A2, A3, A3.5 и A4

Ecosite Elements Layer: 4 оттенка эмали (EB, EL, EM и ED)

Ecosite Elements Highlights: 4 оттенка Highlight (OA2, INC, W и B).

3.2 Целевое назначение

Ecosite Elements предназначен для пломбирования, реставрации и восстановления всех классов полостей любого зубного ряда.

3.3 Показания к применению

Ecosite Elements Pure, оттенки B1, A2, A3, A3.5, A4 и

Ecosite Elements Layer, оттенки EB, EL, EM, ED:

- Пломбирование всех классов полостей любого зубного ряда
- Прямые вкладки, накладки и виниры (вестибулярной и окклюзионной поверхности)
- Восстановление культи зуба
- Шинирование подвижных зубов
- Восстановление

Ecosite Elements Highlight, оттенки OA2 и INC:

- Пломбирование всех классов III-V полостей любого зубного ряда
- Прокладка
- Герметизация фиссур
- Шинирование подвижных зубов
- Восстановление

Ecosite Elements Highlight, оттенки W и B:

- Индивидуальная доводка композитных пломб

3.4 Ограничение применения

Применение материала противопоказано, если невозможно обеспечить сухость рабочей области или соблюсти рекомендуемую технологию применения.

Медицинский персонал должен работать в защитных перчатках!

3.5 Предусмотренное использование

- Потеря твердых тканей зуба в результате кариеса, изломов, истирания зуба или нарушений развития зуба
- Диастема, изменение цвета зубов или незначительное смещение передних зубов
- Заболевания зубов или пародонта, например, травмы и пародонтит, которые требуют шинирования пораженных зубов
- Первичная и вторичная профилактика кариеса

Примечания по применению

- Для оптимальной полимеризации помещайте световод как можно ближе к реставрационному материалу и соблюдайте указания по времени световой полимеризации и интенсивности излучения (см. таблицу). Соблюдайте инструкции производителя используемой фотополимеризационной лампы.
- Соблюдайте указания производителей других материалов, используемых вместе с Ecosite Elements.
- При внесении материала непосредственно в полость рта с помощью одноразового аппликатора в гигиенических целях используйте отдельный аппликатор для каждого пациента.

3.6 Противопоказания к применению

- Применение материала противопоказано, если невозможно обеспечить сухость рабочей области или соблюсти рекомендуемую технологию применения.
- Не использовать непосредственно на открытой пульпе.
- Не использовать материал при наличии известной аллергии на любой из его компонентов или контактной аллергии.

3.7 Потенциальные потребители

Медицинское изделие Ecosite Elements предназначено для профессионального использования стоматологами или связанными медицинскими работниками в клинических условиях.

Целевая группа пациентов

Пациенты, которые получают лечение в ходе стоматологической процедуры.

4. Рекомендованное применение

Медицинский персонал должен работать в защитных перчатках!

1. Очистите зуб. Струей воды удалите все остатки после очистки. Определите оттенок зуба с помощью шкал оттенков Ecosite Pure или Ecosite Layer. Подберите подходящий оттенок или комбинацию оттенков Ecosite Elements.

Примечание: Рекомендуется использовать коффердам.

2. Подготовка полости в соответствии со стандартными правилами для адгезивной процедуры. Сформируйте скос эмали по краям полости. Обеспечьте защиту участков, близких к пульпе.

3. Подготовьте эмаль зуба и нанесите адгезивный праймер согласно инструкциям производителя применяемого материала. Компания DMG рекомендует применять универсальный адгезивный праймер Ecosite Bond.

4. При необходимости используйте прокладку из композита или компомера низкой вязкости. Мы рекомендуем использовать матрицу.

5. Внесите Ecosite Elements в полость, выдерживая максимальнойю толщину слоя в 2 мм. В случае более высоких пломб вносите материал послойно. Выполняйте фотополимеризацию каждого слоя отдельно.

Интенсивность светового излучения	$\geq 1\,000\text{ мВт/см}^2$	$\geq 600\text{ мВт/см}^2$
Время облучения	20 с	40 с
Максимальная толщина слоя	2 мм	2 мм
Длина волны	420 – 480 нм	420 – 480 нм

Примечание: Для щечных или язычных поверхностей зубов рекомендуется проводить дополнительную фотополимеризацию. Перед световым отверждением удалите металлические матрицы.

6. Удаление излишков материала, контурирование и полировку выполняют финишными алмазными инструментами и гибкими полировочными дисками с уменьшающейся абразивностью. Материалу Ecosite Elements можно придать блеск, используя полировочную пасту и полировочные чашки или диски.

Индивидуальная доводка композитных пломб с использованием оттенков W (White) и B (Brown)

1. Выберите цвет, необходимый для получения желаемого оттенка.

2. Налейте достаточное количество выбранного оттенка на палитру для смешивания.

3. Тонкой кисточкой наносите материал на композит слоями толщиной $\leq 0,1\text{ мм}$.

Фотополимеризация каждого слоя производится отдельно.

Примечание: Обязательно покрывайте доводочный слой слоем композита.

Доводочные оттенки можно смешивать друг с другом (для получения новых тонов), но ни в коем случае – с другими продуктами.

Интенсивность светового излучения	$\geq 1\,000\text{ мВт/см}^2$	$\geq 600\text{ мВт/см}^2$
-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------

Время облучения	20 с	40 с
Максимальная толщина слоя	0,1 мм	0,1 мм
Длина волны	420 – 480 нм	420 – 480 нм

4.1 Применение диспенсера Safetip Dispenser Pro

1. Оттяните механизм быстрой блокировки полностью назад.
2. Вставьте наконечник в диспенсер и верните механизм быстрой блокировки на место, чтобы наконечник был четко зафиксирован.
3. Поверните дозирующую часть наконечника в нужном направлении, снимите крышку и, плавно нажимая, распределяйте материал. Не нажимайте очень сильно.
4. Завершив дозирование, потяните механизм быстрой блокировки назад и снимите наконечник.
5. После использования диспенсер Safetip Dispenser Pro необходимо промыть и продезинфицировать.

4.2 Взаимодействие с другими веществами

- Содержащие эвгенол материалы, наличие влаги и масла в воздухе могут препятствовать полимеризации в области контакта. Этого следует избегать.
- Применение ополаскивателей полости рта, индикаторов зубного налета и хлоргексидина может привести к изменению цвета.

4.3 Остаточные риски/побочные эффекты

На данный момент побочных действий обнаружено не было. Нельзя исключать остаточный риск возникновения гиперчувствительности к компонентам материала.

4.4 Предупреждения /меры предосторожности

- Медицинский персонал должен работать в защитных перчатках!
- Хранить в недоступном для детей месте!
- Не допускать контакта с кожей! При случайном попадании на кожу немедленно промыть пораженный участок водой с мылом.
- Не допускать попадания в глаза! При случайном попадании в глаза немедленно тщательно промыть их большим количеством воды, при необходимости проконсультироваться с врачом.
- Повторное использование: Стандартная дезинфекция поверхности в случае необходимости. Не требуется какой-либо специальный уход.
- О серьезных инцидентах, связанных с данным продуктом, необходимо сообщать производителю и соответствующим органам регистрации.

5. Методы и средства очистки и дезинфекции

Согласно положениям ISO 13485:2016, раздел 7.5.1.2.1:

- Материалы Ecosite Elements не нужно очищать или дезинфицировать перед использованием, поскольку продукт будет использоваться в потенциально загрязненной среде (рот пациента).
- Материалы Ecosite Elements не должны стерилизоваться, так как данная процедура разрушает материал.

Дезинфекция диспенсера Safetip Dispenser Pro

После дезинфекции диспенсер наконечников Safetip Dispenser Pro можно использовать повторно, при этом - при появлении видимых признаков износа, например, царапин, его следует заменить. Дезинфекцию можно проводить с помощью имеющегося в продаже дезинфицирующего средства для протирания или погружения. Производитель рекомендует использовать исключительно дезинфицирующие растворы, рекомендуемые институтом RKI (Robert Koch-Institute, Берлин, Германия).

6. Эксплуатационные характеристики продукта

Ecosite Elements Pure (B1, A2, A3, A3.5, A4) и Ecosite Elements Layer (EB, EL, EM, ED) соответствуют стандарту DIN EN ISO 4049:2009 (ГОСТ Р 56924-2016):

тип 1, класс 2, группа 1;

глубина полимеризации ≥ 2 мм при времени фотополимеризации 40 секунд и интенсивности светового излучения ≥ 600 мВт/см² и при времени фотополимеризации 20 секунд и интенсивности светового излучения ≥ 1000 мВт/см²

Ecosite Elements Highlight (OA2 и INC) соответствует стандарту DIN EN ISO 4049:2009 (ГОСТ Р 56924-2016):

тип 2, класс 2, группа 1;

глубина полимеризации ≥ 2 мм при времени фотополимеризации 40 секунд и интенсивности светового излучения ≥ 600 мВт/см² и при времени фотополимеризации 20 секунд и интенсивности светового излучения ≥ 1000 мВт/см².

7. Технические характеристики изделия

Ecosite Elements Pure (B1, A2, A3, A3.5, A4) и Ecosite Elements Layer (EB, EL, EM, ED)

Характеристика	Значение
Прочность на изгиб	≥ 100 МПа
Чувствительность к окружающему свету	≥ 60 с
Глубина полимеризации при 40 с	≥ 2 мм при ≥ 600 мВт/см ²
Глубина полимеризации при 20 с	≥ 2 мм при ≥ 1000 мВт/см ²
Влагопоглощение	≤ 20 мкг/мм ³
Растворимость в воде	≤ 5 мкг/мм ³
Радионепроницаемость	≥ 220 % Al

Стабильность цвета после облучения	Стабильность цвета в соответствии с ISO 4049
Стабильность цвета после поглощения воды	Стабильность цвета в соответствии с ISO 4049
Прочность на сжатие	≥ 300 МПа

Ecosite Elements Highlight (OA2 и INC)

Характеристика	Значение
Прочность на изгиб	≥ 100 МПа
Чувствительность к окружающему свету	≥ 60 с
Глубина полимеризации при 40 с	≥ 2 мм при ≥ 600 мВт/см ²
Глубина полимеризации при 20 с	≥ 2 мм при ≥ 1000 мВт/см ²
Влагопоглощение	≤ 25 мкг/мм ³
Растворимость в воде	≤ 3 мкг/мм ³
Радионепроницаемость	≥ 275 % Al
Стабильность цвета после облучения	Стабильность цвета в соответствии с ISO 4049
Стабильность цвета после поглощения воды	Стабильность цвета в соответствии с ISO 4049
Прочность на сжатие	≥ 350 МПа

8. Характеристики изделия. Состав/сырье

Ecosite Elements оттенки B1, A2, A3, A3.5, A4, EB, EL, EM, ED:

(Барий) стеклоиономерный цемент (ок. 81 %) в смолистой матрице на основе этоксилированного бисфенол А диметакрилата и БИС-ГМА (ок. 19 %). Пигменты, добавки и катализаторы. Содержание наполнителя: около 81 масс. % = 65 об. %. Размер частиц неорганического наполнителя варьируется в диапазоне от 0,02 до 0,7 мкм.

Ecosite Elements оттенки OA2, INC, W и B:

(Барий) стеклоиономерный цемент (ок. 65 %) в смолистой матрице на основе этоксилированного бисфенол А диметакрилата, БИС-ГМА и ТГМ-3 (ок. 34 %). Пигменты, добавки и катализаторы. Содержание наполнителя: ок. 65 масс. % = 38 об. %. Размер частиц неорганического наполнителя варьируется в диапазоне от 0,02 до 0,7 мкм.



Содержит 2-этилгексил 4-(диметиламино) бензоат.

9. Комплект поставки

№	Наименование	Количество
1.	Материал стоматологический наногибридный композитный Ecosite Elements*	1 шт.
2.	Диспенсер наконечников Safetip Dispenser Pro**	1 шт.
3.	Наконечник с замком Luer-Lock**	50 шт./уп.
4.	Вставка Ecosite Elements**	1 шт.

5.	Расцветка Pure**	1 шт.
6.	Расцветка Layer**	1 шт.
Примечание: с каждым вариантом исполнения поставляется инструкция по применению. * - вариант исполнения выбирается из представленного состава (см. п. 1) ** - поставляется при необходимости		

10. Срок годности, хранение, транспортировка, эксплуатация и утилизация

Для материала Ecosite Elements, поставляемого в шприцах и наконечниках, срок годности составляет 24 месяца (2 года) с момента изготовления. Материал следует хранить при температуре от 2 до 25 °С, а после использования шприцы следует закрывать прилагаемым колпачком. Материал можно использовать при комнатной температуре. Материал не следует использовать после истечения срока годности.

При транспортировке и перевозке не следует превышать температурный диапазон от 2 до 25 °С и относительную влажность 75% в течение максимума 24 дней транспортировки.

Пустые шприцы и наконечники могут быть утилизированы вместе с обычными отходами стоматологической клиники в соответствии с местными правилами. Неиспользованные материалы Ecosite Elements пастообразного типа классифицируются как опасные отходы в Европейском Союзе и должны быть сожжены или утилизированы в соответствии с местными правилами обращения с опасными отходами.

Согласно действующим нормам в Российской Федерации, регламентированным СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" при утилизации медицинское изделие или его части относятся к медицинским отходам:

Класс Б - эпидемиологически опасные отходы: части медицинского изделия, загрязненные выделениями и отходами пациента.

11. Гарантийные обязательства

При соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки производитель гарантирует соответствие медицинского изделия требованиям настоящей документации на протяжении всего срока годности.

12. Перечень применяемых стандартов

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ Р 56924-2016	Стоматология. Материалы полимерные восстановительные
ГОСТ 31574-2012	Материалы стоматологические полимерные восстановительные. Технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в

	сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ГОСТ 31214-2016	Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность
ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными
ГОСТ ISO 10993-5-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro
ГОСТ ISO 10993-10-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
ГОСТ ISO 10993-11-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия
ГОСТ ISO 10993-12-2015	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы


Register of Deeds No. 390 / 2023 / T

I, the notary Dr. Friederike Freifrau von Türckheim zu Altdorf, herewith certify that the above is the true signature, acknowledge in my presence, of

Mrs Dr Ulrike **Diekmann** née Lau
born on 26th January 1987,
resident of the city of Hamburg,
business address: Elbchaussee 576, 22587 Hamburg (Germany),
who is personally known to me.

Hamburg, 9th June 2023

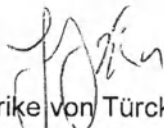


Dr. Friederike von Türckheim
Notary Public



DMG

DMG Эльбгауштрассе, 248, 22547 Гамбург, Германия

«УТВЕРЖДАЮ»

«Глава отдела по вопросам государственной регистрации»

«DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH»

(ДМГ Химико-фармацевтическая фабрика ГмбХ)

Др. Ульрике Дикманн

/подпись/

подпись

Штамп: DMG

DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

(ДМГ Химико-фармацевтическая фабрика ГмбХ)

Эльбгауштрассе 248 – 22547 Гамбург – Германия

info@dmg-dental.com – www.dmg-dental.com

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

*Материал стоматологический наногибридный
композитный Ecosite Elements с принадлежностями, в
вариантах исполнения*

**НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА
БЛАНКЕНЕЗЕР МАРКТ**

№ 390 в реестре регистрации нотариальных действий за год 2023/Т

Я, Др. Фридерике Фрайфрау фон Тюркхейм из Альтдорфа, настоящим свидетельствую подлинность подписи, которая сделана в моем присутствии

г-жой Др. Ульрике Дикманн, урожденная Лау
26 января 1987 г.р.,
место постоянного проживания: Гамбург,
адрес: Эльбшосзее 576, 22587 Гамбург (Германия),
личность которой мной установлена.

г. Гамбург, 09 июня 2023г.

Др. Фридерике Фрайфрау фон Тюркхейм,
нотариус

Овальная печать: Др. Фридерике Фрайфрау фон Тюркхейм из Альтдорфа
Печать нотариуса
Гамбург

Дорминштрассе 1, 22587 Гамбург-Бланкенезе – Телефон: +49 (0)40 86 16 56
Факс: +49 (0)40 86 44 42 – Электронная почта: info@notariat-blankeneseer-markt.de – Парковочные места перед
нотариальной конторой
Хранение официальных документов нотариуса Юлии Пробст в отставке

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Марковым Александром Александровичем.

Российская Федерация

Город Москва

Тридцатого июня две тысячи двадцать третьего года

Я, Литвинова Татьяна Николаевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Якубовой Татьяны Олеговны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Маркова Александра Александровича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2171-н/77-2023-35746

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 16 лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса



Т.Н. Литвинова

