



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

***Салфетки медицинские дезинфицирующие
одноразовые «Дезивайпс®»
по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022***

Версия 2.0

1 НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс[®]» по 32.50.50-001-09521947-2022 (далее по тексту – «салфетки» или «изделие»).

2 ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

См. приложение 1.

3 НАЗНАЧЕНИЕ

Для обработки неповрежденной кожи, очищения и дезинфекции медицинских изделий и оборудования, а также поверхностей всех видов с целью обеззараживания и уничтожения патогенных микроорганизмов.

4 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для персонала лечебно-профилактических учреждений и организаций (ЛПУ и ЛПО) различного профиля, включая хирургические, терапевтические, акушерско-гинекологические, кожно-венерологические, педиатрические, роддома и родильные отделения (в т.ч. детские отделения, отделения неонатологии и экстракорпорального оплодотворения), центры трансплантации органов, патологоанатомические, офтальмологические, физиотерапевтические и другие отделения; для стоматологических клиник, туберкулезных диспансеров, амбулаторий, поликлиник; микробиологических, клинических, биохимических, серологических и других профильных диагностических лабораторий различных подчинений; на станциях скорой и неотложной медицинской помощи, донорских пунктах и пунктах переливания крови, медико-санитарных частей.

5 АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ

Салфетки «Дезивайпс[®]» обладают антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека), патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

6 КРАТНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изделие одноразового использования.

7 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Пациенты, медицинский персонал.

8 СТЕРИЛЬНОСТЬ

Нестерильное изделие, перед использованием не требует стерилизации.

9 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для обработки неповрежденной кожи, очищения и дезинфекции медицинских изделий и оборудования, а также поверхностей всех видов с целью обеззараживания и уничтожения патогенных микроорганизмов.

10 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не применять при индивидуальной непереносимости этилового спирта.
- Не использовать для обработки ран и слизистых оболочек.
- Не обрабатывать поверхности объектов, портящихся от воздействия спиртов. Перед применением рекомендуется проверить действие средства на небольшом малозаметном участке поверхности.
- По истечении срока годности или при высыхании салфеток, а также при неправильном хранении их использование запрещается.

11 ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Раздражающее действие или аллергическая реакция в связи с индивидуальной непереносимостью компонентов средства.

12 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Запрещено использование не по назначению.
- Запрещено повторное использование.
- Средство использовать только по назначению в соответствии с Инструкцией по применению. Обработку небольших по площади поверхностей и объектов при соблюдении норм расхода можно проводить без средств индивидуальной защиты в присутствии людей.
- При наличии повреждений кожных покровов рук необходимо проводить обработку с защитой кожи рук резиновыми перчатками.
- Не использовать для обработки ран и слизистых оболочек.
- Избегать попадания пропиточного раствора в глаза.
- По истечении срока годности или высыхании салфеток, а также при неправильном их хранении, использование салфеток запрещается.
- Легко воспламеняется! Запрещается проводить обработку помещения при включенных нагревательных электроприборах, вблизи открытого огня или нагретых выше плюс 35°C поверхностей, при наличии в обрабатываемом помещении горючих паров (бензин, эфир). Если невозможно полностью отключить подачу электричества, следует следить, чтобы не производилось включение / выключение электроприборов, особенно автоматическое. Не курить во время использования!

13 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- При случайном попадании пропиточного раствора в глаза их следует тщательно промыть проточной водой и закапать 20% – 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.
- При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу, пострадавшего вывести на свежий воздух, рот и носоглотку прополоскать водой.
- При появлении на коже раздражений, сыпи, следует прекратить применение салфеток, руки вымыть водой с мылом.
- При попадании пропиточного состава в желудок: не вызывать рвоту! Запить его большим количеством воды, после этого принять 10-15 измельченных таблеток активированного угля, обратиться за медицинской помощью.

14 ПОРЯДОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ

- Салфетки, упакованные в полимерные банки, ведра, необходимо начинать использовать из центра рулона, удалив при первом вскрытии 2-3 салфетки, по режимам, указанным в таблице 1. При наличии покровной пленки ее необходимо удалить!
- Салфетки, упакованные во флоу-пак: открыть пластиковый клапан, отклеить многоразовый защитный клапан либо разрезать ножницами пленку в указанном месте, извлечь и развернуть салфетку и сразу провести обработку, по режимам, указанным в таблице 1.
- Салфетки, упакованные в саше необходимо вскрыть по линии отрыва с боку, извлечь салфетку и сразу провести обработку, по режимам, указанным в таблице 1.
- Если в процессе использования крайняя салфетка высохла, ее необходимо выбросить и использовать следующую.

ВНИМАНИЕ! Нельзя применять салфетки для обработки поверхностей, восприимчивых к спиртам (покрытых лаком, изготовленных из акрилового стекла и других материалов, подверженных действию спиртов). Перед применением рекомендуется проверить действие салфеток на небольшом малозаметном участке поверхности.

15 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- Салфетки в одном варианте исполнения;
- инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку).

16 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

16.1 Гигиеническая обработка рук (в том числе обработка рук хирургов). Перед применением вскрыть упаковку, извлечь и развернуть салфетку, тщательно обработать руки, обращая особое внимание на обработку кончиков пальцев и межпальцевых пространств кистей рук, время обработки – 20 секунд. Для профилактики вирусных инфекций обработку проводят однократно, время обработки – 30 секунд. Для профилактики туберкулеза обработку проводят дважды, используя каждый раз новую салфетку, общее время обработки – 2 минуты.

16.2 Обеззараживание кожи инъекционного поля. Упаковку вскрыть, быстро достать и развернуть салфетку, тщательно протереть кожу инъекционного поля. Время выдержки после окончания обработки – 20 секунд.

16.3 Обработка кожи операционного поля, локтевых сгибов доноров, кожи перед введением катетеров и пункций суставов. Упаковку вскрыть, быстро достать и развернуть салфетку. Кожу двукратно протирают в одном направлении двумя разными салфетками. Время выдержки после окончания обработки – 90 секунд.

16.4 Профилактическая обработка ступней ног. Тщательно обработать кожу каждой ступни ног разными салфетками. Время обработки каждой ступни – 30 секунд.

16.5 Частичная санитарная обработка кожных покровов. Перед применением вскрыть упаковку, извлечь и развернуть салфетку, тщательно обработать участки кожных покровов, подлежащие дезинфекции. Время дезинфекционной выдержки после обработки участка кожных покровов, подлежащего дезинфекции, составляет 20 секунд.

16.6 Очищение и дезинфекция медицинских изделий. Перед применением вскрыть упаковку, извлечь и развернуть салфетку и сразу провести обработку. Поверхность, подлежащую очистке и дезинфекции, тщательно протереть салфеткой. Сильно загрязнённые поверхности обработать в два этапа: сначала одной салфеткой очистить от загрязнений, затем новой салфеткой тщательно протереть поверхность.

Таблица 1. Режимы обеззараживания различных поверхностей Салфетками медицинскими, дезинфицирующими одноразовыми «Дезивайпс®».

Объект обработки	Вид инфекции	Время обеззараживания, минут	Способ обработки
Небольшие по площади поверхности в помещениях, поверхности медицинского оборудования	Бактериальные (кроме туберкулеза)	0,5	Протирание
	Бактериальные (кроме туберкулеза), грибковые (кандидозы), вирусные	1	Протирание
	Бактериальные (кроме туберкулеза), грибковые (кандидозы, дерматофитии), вирусные	3	Протирание
	Бактериальные (включая туберкулез), грибковые (кандидозы, дерматофитии), вирусные	5	Двукратное протирание (с интервалом 1 минута)

Поверхности медицинских изделий	Бактериальные (кроме туберкулеза), грибковые (кандидозы)	2	Двукратное протирание (с интервалом 1 минута)
	Бактериальные (кроме туберкулеза), грибковые (кандидозы, дерматофитии),	3	Двукратное протирание (с интервалом 1 минута)
	Бактериальные (включая туберкулез), грибковые (кандидозы, дерматофитии), вирусные	5	Двукратное протирание (с интервалом 1 минута)

17 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделия по внешнему виду и технологии изготовления должны соответствовать требованиям технической документации.

Таблица 2. Основные технические характеристики.

п/п	Вид упаковки	Размеры салфетки, мм	Предельные отклонения, мм	Масса салфетки с пропиточным раствором, не более г
1	Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс [®] » саше	80x80	± 4	8
		100*100		
		100*110		
		100*120		
		100*125		
		100*135		
		100*140		
		100*150		
		100*160		
		100*170		
		100*180		
		100*190		
		100*200		
		110*110		
		110*125		
		115*130		
		115*150	± 5	11
		120*130		
		125*125		
		130*150		
		130*180		
		130*190		
		130*200	± 5	11
		135*145		
		135*185		
		135*200		

		140*190	± 7	18
		140*200		
		150*150		
		150*200		
		185*185		
		185*200		
		200*200		
		200*220		
		200*240		
		200*250		
		200*300		
		200*350		
		220*220		
		220*250		
		220*300		
		220*400		
		230*300		
		240*240		
2	Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс ^к » флоу-пак	150*180	± 5	11
		180*200	± 7	15
		200*200		
3	Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс ^к » в банке	125*170	± 5	11
		130*190		
		150*180		
4	Салфетки в герметичных ведрах с диспенсером, пропитанные средством «Дезивайпс ^к »	125*175	± 5	13
		150*170		
		175*190		
		300*150	± 7	23
		360*175		

Описание внешнего вида

Салфетки представляют собой готовые к использованию изделия однократного применения из белого нетканого материала. Изделия равномерно пропитаны дезинфицирующей композицией (пропиточным раствором), с характерным запахом этилового спирта и применяемой отдушки.

Основные используемые материалы

Назначение материала	Наименование материала	Производитель/ Поставщик
Салфетка	Спанлейс от 35,0 г/м ² до 50,0 г/м ²	ООО «Авангард», Россия
	Спанбонд 20 г/м ²	ООО «Нетканика», Россия
	Термобонд 21 г/м ²	Shalag Industries LTD, Израиль

Пропиточный раствор	Спирт этиловый – 63,0 % масс. (в пересчете на безводный спирт)		ООО “КурскПродукт”, Россия
	комплекс четвертичных аммониевых соединений (ЧАС): алкилдиметилбензиламмония хлорид – 0,1% масс.		ООО «РусХимСинтез», Россия
	дидецилдиметиламмония хлорид – 0,1% масс.		“Nouryon Surface Chemistry AB”, Швеция
	хлоргексидина биглюконат – 0,5% масс.		“Bajaj Healthcare LTD.”, Индия
	молочная кислота – 0,1% масс.;		“Henan Jindan Lactic Acid Technology CO., LTD”, Китай
	вспомогательные компоненты и вода	Глицерин, CAS номер: 56-81-5	“Meridional TCS Industria E Comercio DE Oleos S/A”, Бразилия
		Кокаmidопропил бетаин, CAS номер: 61789-40-0	“Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.A”, Италия
		Тетранатриевая соль ЭДТУК (4Na-ЭДТА), CAS номер: 10378-23-1	“Shijiazhuang Jackchem CO., LTD”, Китай
		Отдушка “Морская свежесть” (AR 265507)	“CPL Aromas LTD”, Англия
		Вода умягченная	АО НПО “Химсинтез”, Россия

Изделие кратковременного контакта (≤ 24 часов) с неповрежденной кожей человека.

18 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Не применимо.

19 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

19.1 Салфетки в упакованном виде транспортируются транспортом всех видов в крытых транспортных средствах (при температурах от -10°C до $+30^{\circ}\text{C}$) в соответствии с правилами перевозки груза, действующими на транспорте каждого вида, при условии обеспечения его сохранности от загрязнений, механических повреждений и атмосферных осадков.

19.2 Салфетки транспортируются морским путём в соответствии с «Правилами безопасности перевозки грузов». Вид отправки – контейнеры по ГОСТ 20435 с коэффициентом использования 0,9. Условия транспортирования систем внутри страны и в районы с умеренным климатом должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

19.3 Салфетки хранят в плотно закрытой упаковке производителя по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: в крытых сухих вентилируемых складских помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от -10°C до $+30^{\circ}\text{C}$, в местах недоступных детям.

19.4 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

19.5 В аварийной ситуации (при нарушении целостности потребительской упаковки) салфетки необходимо собрать и отправить на утилизацию.

20 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

20.1 Изготовитель гарантирует соответствие салфеток требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

20.2 Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения.

20.3 После вскрытия защитной пленки упаковки салфеток срок хранения – 5 месяцев при соблюдении условий хранения и применения.

21 УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

21.1 Утилизация салфеток осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиНом 2.1.3684 для отходов класса Б.

21.2 Правильная утилизация позволит предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

22 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «ДЕЗНЭТ», Россия, 129337, г. Москва, ш. Ярославское, д. 19, стр. 1, этаж 5 пом. II, ком. 5. Тел.: 8-495-225-95-59, e-mail: info@deznet.ru.

Адрес места производства: АО НПО «Химсинтез», Российская Федерация, Московская область, г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 33, строен. 1, строен. 8, корп. 1, 2, 3, 4.

23 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗНЭТ» (ООО «ДЕЗНЭТ»), Россия, 129337, г. Москва, ш. Ярославское, д. 19, стр. 1, этаж 5 пом. II, ком. 5. Тел.: 8-495-225-95-59, e-mail: info@deznet.ru.

24 СИМВОЛЫ МАРКИРОВКИ

24.1 На каждое изделие должна быть нанесена потребительская маркировка, на которой указано:

- наименование изготовителя, его юридический адрес, телефон, электронная почта и сайт, адрес места производства;
- наименование изделия и варианта исполнения;
- отличительные характеристики;
- назначение;
- антимикробная активность;
- способ применения;
- дата изготовления (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- номер партии;
- номер регистрационного удостоверения и дата выдачи;
- товарный знак;
- состав пропиточного раствора с указанием массовой доли действующих веществ, вспомогательных компонентов;
- количество салфеток в упаковке, размер;
- гарантийный срок годности;
- коммерческое обозначение компании;
- слоган компании «к здоровью через гигиену»;
- символ «обратитесь к инструкции по применению»;
- символ «запрет на повторное применение»;
- символ «не использовать при повреждении упаковки»;
- способ утилизации.

Примечания:

1 Допускается заменять надписи на маркировке медицинского изделия на символы по ГОСТ Р ИСО 15233-1.

24.2 Групповая потребительская маркировка должна содержать следующую информацию:

– наименование изготовителя, его юридический адрес, телефон, электронная почта и сайт, адрес места производства;

- наименование изделия, варианта исполнения, размер;
- назначение;
- дата изготовления (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- номер партии;
- номер регистрационного удостоверения и дата выдачи;
- товарный знак;
- способ применения;
- гарантийный срок годности;
- коммерческое обозначение компании;
- слоган компании «к здоровью через гигиену»;
- состав пропиточного раствора с указанием массовой доли действующих веществ.

вспомогательных компонентов:

- штрих-код;
- количество салфеток в упаковке, размер;
- меры предосторожности, меры первой помощи в соответствии с инструкцией по применению;
- символ «обратитесь к инструкции по применению»;
- символ «запрет на повторное применение»;
- символ «не допускать воздействия солнечного света»;
- символ «не использовать при повреждении упаковки»;
- символ «предел температуры»;
- условия хранения;
- способ утилизации.

24.3 На потребительской маркировке, для флоу-пак, банки и ведра должно быть указано:

– наименование изготовителя, его юридический адрес, телефон, электронная почта и сайт, адрес места производства;

- наименование изделия и варианта исполнения;
- назначение;
- дата изготовления (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- номер партии;
- номер регистрационного удостоверения и дата выдачи;
- товарный знак;
- отличительные характеристики;
- антимикробная активность;
- гарантийный срок годности;
- состав пропиточного раствора с указанием массовой доли действующих веществ.

вспомогательных компонентов;

- коммерческое обозначение компании;
- слоган компании «к здоровью через гигиену»;
- изображения объектов ЛПУ;
- штрих-код;

- способ применения;
- порядок ввода в эксплуатацию изделия;
- количество салфеток в упаковке, размер;
- меры предосторожности, меры первой помощи в соответствии с инструкцией по применению;
- символ «обратитесь к инструкции по применению»;
- символ «запрет на повторное применение»;
- символ «не допускать воздействия солнечного света»;
- символ «не использовать при повреждении упаковки»;
- символ «предел температуры»;
- условия хранения;
- способ утилизации.

Примечания:

1 Допускается заменять надписи на маркировке медицинского изделия на символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1.

24.4 Транспортная маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 14192. На транспортную тару должна быть нанесена маркировка, на которой указано:

– наименование изготовителя, его юридический адрес и сайт, адрес места производства;

- наименование изделия и варианта исполнения;
- назначение;
- дата изготовления (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- коммерческое обозначение компании;
- номер партии;
- количество единиц потребительских упаковок;
- количество салфеток в упаковке;
- размер салфеток;
- номер регистрационного удостоверения и дата выдачи;
- товарный знак;
- гарантийный срок годности;
- масса брутто;
- манипуляционные знаки, имеющие значение «Беречь от солнечных лучей», «Верх», «Предел температуры» по ГОСТ 14192;
- штрих-код.

25 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ СТАНДАРТОВ

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;
- ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность»;
- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;
- ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными»;
- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий (часть 1, 5, 10);
- ГОСТ ISO 10993-12-2015 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы»;

- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования».

Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс®» по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022, варианты исполнения:

I. Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс®» по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022, флоу-пак:

1. Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс®» по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022, 150 x 180 мм, флоу-пак, 120 шт.;
2. Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс®» по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022, 180 x 200 мм, флоу-пак, 100 шт.;
3. Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс®» по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022, 200 x 200 мм, флоу-пак, 80 шт.;

II. Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс®» по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022, в банке:

1. Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс®» по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022, 125 x 170 мм, в банке, 100 шт.;
2. Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс®» по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022, 125 x 170 мм, в банке, 200 шт.;
3. Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс®» по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022, 130 x 190 мм, в банке, 60 шт.;
4. Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс®» по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022, 130 x 190 мм, в банке, 100 шт.;
5. Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс®» по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022, 150 x 180 мм, в банке, 250 шт.;

III. Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс®» по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022, в ведре:

1. Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс®» по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022, 125 x 175 мм, в ведре, 250 шт.;
2. Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс®» по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022, 150 x 170 мм, в ведре, 250 шт.;
3. Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс®» по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022, 150 x 170 мм, в ведре, 300 шт.;
4. Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс®» по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022, 300 x 150 мм, в ведре, 100 шт.;
5. Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс®» по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022, 300 x 150 мм, в ведре, 150 шт.;
6. Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс®» по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022, 360 x 175 мм, в ведре, 120 шт.;
7. Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс®» по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022, 175 x 190 мм, в ведре, 1000 шт.;

IV. Салфетки медицинские дезинфицирующие одноразовые «Дезивайпс®» по ТУ 32.50.50-001-09521947-2022, размеры: 80 x 80 мм, 100 x 100 мм, 100 X 110 мм, 100 X 120 мм, 100 X 125 мм, 100 x 135 мм, 100 x 140 мм, 100 x 150 мм, 100 X 160 мм, 100 X 170 мм, 100 x 180 мм, 100 x 190 мм, 100 x 200 мм, 110 X 110 мм, 110 X 125 мм, 115 x 130 мм, 115 x 150 мм, 120 x 130 мм, 125 x 125 мм, 130 X 150 мм, 130 x 180 мм, 130 x 190 мм, 130 x 200 мм, 135 x 145 мм, 135 X 185 мм, 135 x200 мм, 140 x 190 мм, 140 x200 мм, 150 x150 мм, 150 X 200 мм, 185 x 185 мм, 185 x 200 мм, 200 x 200 мм, 200 x 220 мм, 200 x 240 мм, 200 X 250 мм, 200 x 300 мм, 200 x 350 мм, 220 x 220 мм, 220 x 250 мм, 220 X 300 мм, 220 x 400 мм, 230 x 300 мм, 240 x 240 мм; саше, 1 шт.

Эксплуатационная документация:

- инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку).

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на _____ (*двадцати*) листах

Генеральный директор ООО «ДЕЗНЭТ»



/ Дымов М.С. /

(печать, подпись)