

**Фотографические изображения медицинского изделия:
«Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз,
стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021»**



створ для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 20.23-003-29792921-2021 (Макет потребительской упаковки с маркировкой для флакона 30 мл).



ВНИМАНИЕ!

Необходимо соблюдать правила по уходу за линзами, рекомендованные Вашим врачом. Во избежание загрязнения раствора не допускать соприкосновения наконечника флакона с посторонними предметами. Не использовать раствор по истечении срока годности. Использовать раствор не более 6 месяцев после вскрытия флакона. Беречь от детей! Хранить при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 80% при $+25^{\circ}\text{C}$.

Производитель:

ЗАО «ОПТИМЕД СЕРВИС»

Россия, 453128, РБ, г. Оренбург,
ул. Жданбердина, д. 145.

Адрес для корреспонденции:

Россия, 450054, г. Уфа,

ул. 50 лет СССР, 8.

тел./факс:

+7 (347) 223-44-33, 227-62-62

E-mail: marketing@optimed.ru

www.optimed-ufa.ru

Свидетельство на товарный знак
№ 765045 от 03.07.2020.

пор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ
00.23-003-29792921-2021 (Макет потребительской упаковки с маркировкой для флакона 30 мл).



OPTIMED[®] *plus*

Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - "Оптимед+" по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 в комплектации:

- флакон с раствором 125 мл. – 1 шт.;
- крышка – 1 шт.;
- дозатор – капельница – 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

РУ № ФСР 2011/11989 от

Состав: натрий хлористый $7,0 \pm 0,5$ г., кислота борная $3,0 \pm 0,5$ г., глицерин $2,0 \pm 0,2$ г., натрий тетраборат 10-водный $0,6 \pm 0,1$ г., натрий карбоксиметилцеллюлоза $0,6 \pm 0,1$ г., этилендиамин-N,N,N,N'-тетрауксусной кислоты динатриевая соль, 2-водная (трилон Б) $0,5 \pm 0,1$ г., гуанидина гидрохлорид $0,1 \pm 0,01$ г., твин 80 $0,015 \pm 0,004$ г., смесь диметилоксиламмоний хлоридов из группы ЧАС $0,002 \pm 0,0005$, вода дистиллированная до 1,00 л.

STERILE A



створ для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 20.23-003-29792921-2021 (Макет потребительской упаковки с маркировкой для флакона 30 мл).

Дата выпуска:
Годен до:
Партия №:

05 05 21 A
05 05 23
007

Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 (Макет потребительской упаковки с маркировкой для флакона 30 мл).



1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
 Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный
 РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 в комплектации:
 - Флакон с раствором 30, 60, 90, 125, 250 и 360 мл - 1 шт.
 - Крышка - 1 шт.
 - Дозатор-капельница - 1 шт.
 - Контейнер для хранения линз - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.

Инструкция по применению может быть включена в этикетку.

РАЗРАБОТЧИК/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
 ЗАО «Оптимедорвис», Россия
 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 145

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
 ЗАО «Оптимедорвис», Россия
 453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Воннов — Интернационалистов, д. 17

2. НАЗНАЧЕНИЕ, ПОКАЗАНИЯ, УСЛОВИЯ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
 «Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021» (далее - «Раствор «Оптимед+»») предназначен для ежедневного ухода за всеми типами мягких контактных линз и обеспечивает очистку, промывку, дезинфекцию, удаление всех видов отложений с поверхности мягких контактных линз, в том числе протеиновых отложений, хранение.

Показания к применению

Раствор «Оптимед +» рекомендован для ежедневного ухода за всеми типами мягких контактных линз.
 Содержащиеся в растворе антимикробные агенты широкого спектра действия и очищающие компоненты разрушают накопившиеся в процессе ношения отложения и загрязнения, которые затем легко смываются при очистке и промывке линз, что помогает поддерживать их чистоту, прекрасные оптические характеристики, обеспечивать безопасность при ношении контактных линз. Раствор «Оптимед +» можно капать непосредственно на контактные линзы, не снимая их.

Условия применения

«Раствор «Оптимед+» применяют в домашних условиях для ежедневного ухода за контактными линзами.

Область применения

Офтальмология (контактная коррекция зрения).

Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 (общий вид с этикеткой для флакона 30 мл).

ИНСТРУКЦИЯ

Очистка: снимите линзу и положите ее на ладонь. Нанесите несколько капель универсального раствора «Оптимед+» на линзу и аккуратно потрите ее указательным пальцем.

Промывка: тщательно промойте каждую сторону линзы универсальным раствором.

Дезинфекция: поместите промытую линзу в соответствующее отделение контейнера для линз и наполните свежим раствором до полного погружения линзы. Оставьте, по меньшей мере, на 4 часа. Проведите вышеперечисленные операции с другой линзой. Перед тем, как надеть линзы, промойте их раствором «Оптимед+».

ВНИМАНИЕ! во избежание загрязнения раствора не допускать соприкосновения наконечника флакона с посторонними предметами.

Не использовать раствор по истечении срока годности. Использовать раствор не более 6 месяцев после вскрытия флакона.

Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 30 мл.

раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792-2021
 комплектации: - флакон с раствором 30 мл. - 1 шт.; - крышка
 - капельница - 1 шт. РУ № ФСР 2011И11989
 состав: натрий хлористый $7,0 \pm 0,5$ г., кислота борная $1,0 \pm 0,1$ г.,
 гидроксид натрия $2,0 \pm 0,2$ г., натрий тетраборат 10-водный $0,6 \pm 0,1$ г.,
 этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль, 2-водный
 $0,5 \pm 0,1$ г., гуанидина гидрохлорид $0,21$ г., твин 80 $0,015 \pm 0,004$ г., смесь
 тетрабензиламмоний хлоридов из группы
 АС $1,002 \pm 0,0008$, вода дистиллированная до
 100 мл. Стерильно - РЛ.

необходимо соблюдать правила по уходу за
 линзами, рекомендованные Вашим врачом.
 Избегать детей! Хранить при температуре от
 $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не
 менее 80% при $+25^{\circ}\text{C}$.

адрес производства: Россия, 450083,
 г. Уфа, ул. Октябрьская, 8.

телефон: (347) 223-44-33, 277-62-62

сайт: www.optimed-ufa.ru, www.optimed-ufa.ru

производитель: ЗАО «Оптимедсервис», Россия,
 450083, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 145.

патент на товарный знак № 55045 от 03.07.2020

STERILE A



Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 30 мл.



Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 (Макет потребительской упаковки с маркировкой для флакона 60 мл).



1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
 Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 в комплектации:
 - Флакон с раствором 30, 60, 90, 125, 250 и 360 мл - 1 шт.
 - Крышка - 1 шт.
 - Дистро-жидкость - 1 шт.
 - Купон для хранения линз - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.

Инструкция по применению может быть включена в этикетку.

РАЗРАБОТЧИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «Оптимедорвис», Россия
 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердиев, д. 145

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ЗАО «Оптимедорвис», Россия
 453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Воинки — Интернационалистов, д. 17

2. НАЗНАЧЕНИЕ, ПОКАЗАНИЯ, УСЛОВИЯ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

«Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021» (далее «Раствор «Оптимед+»») предназначен для ежедневного ухода за всеми типами мягких контактных линз и обеспечивает очистку, промывку, дезинфекцию, удаление водородных соединений с поверхности мягких контактных линз, в том числе протеиновых отложений, хранение.

Показания к применению

Раствор «Оптимед+» рекомендован для ежедневного ухода за всеми типами мягких контактных линз.

Содержащиеся в растворе антибактериальные агенты широкого спектра действия и очищающие компоненты способствуют накоплению в процессе ношения отложений и загрязнений, которые затем легко смываются при очистке и промывке линз, что помогает поддерживать их чистоту, прекрасные оптические характеристики, обеспечивать безопасность при ношении контактных линз. Раствор «Оптимед+» можно капать непосредственно на контактные линзы, не снимая их.

Условия применения

«Раствор «Оптимед+»» применяется в домашних условиях для ежедневного ухода за контактными линзами.

Область применения

Офтальмология (коррекция зрения).

Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 (общий вид с этикеткой для флакона 60 мл).



Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 60 мл.



Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 (Макет потребительской упаковки с маркировкой для флакона 90 мл).



1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
 Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 в комплекте:
 - Флакон с раствором 30, 60, 90, 125, 250 и 500 мл - 1 шт.
 - Крышка - 1 шт.
 - Дозатор-капельница - 1 шт.
 - Контейнер для хранения линз - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.

Инструкция по применению может быть включена в упаковку.

РАЗРАБОТЧИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
 ЗАО «Оптимед+», Россия
 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердиева, д. 143

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
 ЗАО «Оптимед+», Россия
 453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзал — Интернациональная, д. 17


2. НАИЗНАЧЕНИЕ, ПОКАЗАНИЕ, УСЛОВИЯ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
 «Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021» (далее - «Раствор «Оптимед+»») предназначен для ежедневного ухода за всеми типами мягких контактных линз и обеспечивает очистку, промывку, дезинфекцию, увлажнение всех видов отложений с поверхности мягких контактных линз, в том числе протеиновых отложений, хранение.

Показания и применение
 Раствор «Оптимед+» предназначен для ежедневного ухода за всеми типами мягких контактных линз.
 Содержащиеся в растворе антисептические агенты широкого спектра действия и оптические компоненты разрушают накопившиеся в процессе ношения отложения и загрязнения, которые могут мешать остроте зрения при очистке и промывке линз, что помогает поддерживать их чистоту, прозрачность оптические характеристики, обеспечивать безопасность при ношении контактных линз. Раствор «Оптимед+» можно применять непосредственно на контактные линзы, не снимая их.

Условия применения
 «Раствор «Оптимед+» применяют в домашних условиях для ежедневного ухода за контактными линзами.

Область применения
 Офтальмология (коррекция зрения).

Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 (общий вид с этикеткой для флакона 90 мл).

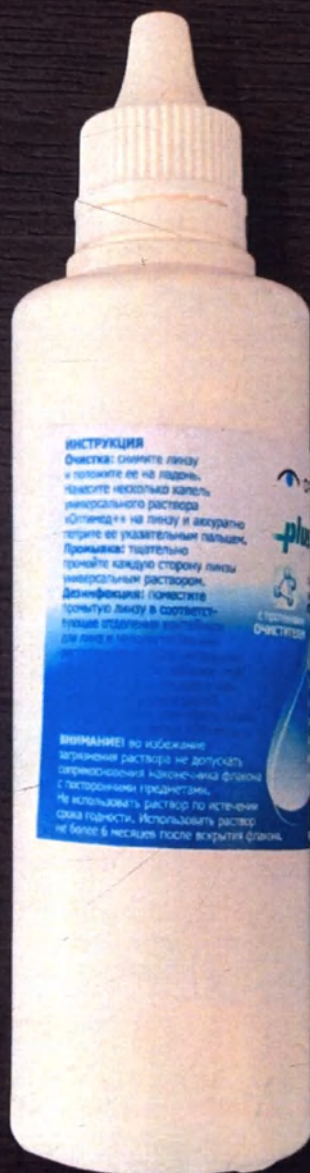

Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 90 мл.



Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 (Макет потребительской упаковки с маркировкой для флакона 125 мл).



1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 в комплекте:

- Флакон с раствором 30, 60, 90, 125, 250 и 360 мл - 1 шт;
- Крышка - 1 шт;
- Дозатор-капельница - 1 шт;
- Конвертер для хранения линз - 1 шт (при необходимости);
- Инструкция по применению - 1 шт.

Инструкция по применению может быть вложена в упаковку.

РАЗРАБОТЧИК/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ИАО «Оптимедсервис», Россия
453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердиева, д. 145

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ИАО «Оптимедсервис», Россия
453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзала — Интернациональная, д. 17

2. НАЗНАЧЕНИЕ, ПОКАЗАНИЯ, УСЛОВИЯ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

«Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021» (далее «Раствор «Оптимед+»») предназначен для ежедневного ухода за всеми типами мягких контактных линз и обеспечивает очистку, промывку, дезинфекцию, удаление влаги, высушивание и поддержание мягких контактных линз в том числе при длительном хранении, хранение.

Показания к применению

Раствор «Оптимед+» рекомендуется для ежедневного ухода за всеми типами мягких контактных линз.
Содержащиеся в растворе антимикробные агенты широкого спектра действия в оптимальной концентрации разрушают микроорганизмы в процессе извлечения кислорода и загрязнения, которые затем легко смываются при очистке и промывке линз, что помогает поддерживать их частоту прекрасных оптических характеристик, обеспечивать безопасность при ношении контактных линз. Раствор «Оптимед+» можно капать непосредственно на контактные линзы, не снимая их.

Условия применения

«Раствор «Оптимед+» применяется в домашних условиях для ежедневного ухода за контактными линзами.

Область применения

Офтальмология (контактная коррекция зрения).


Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 (общий вид с этикеткой для флакона 125 мл).



Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 125 мл.




Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 (Макет потребительской упаковки с маркировкой для флакона 250 мл).

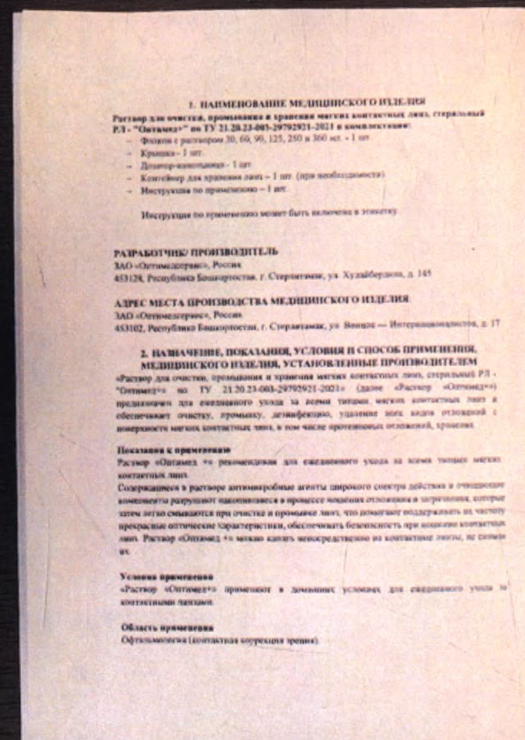


Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 (общий вид с этикеткой для флакона 250 мл).



Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 250 мл.

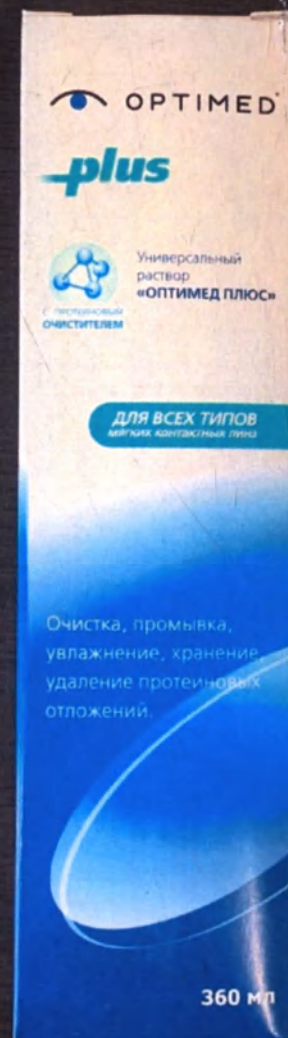


Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 (Макет потребительской упаковки с маркировкой для флакона 360 мл).

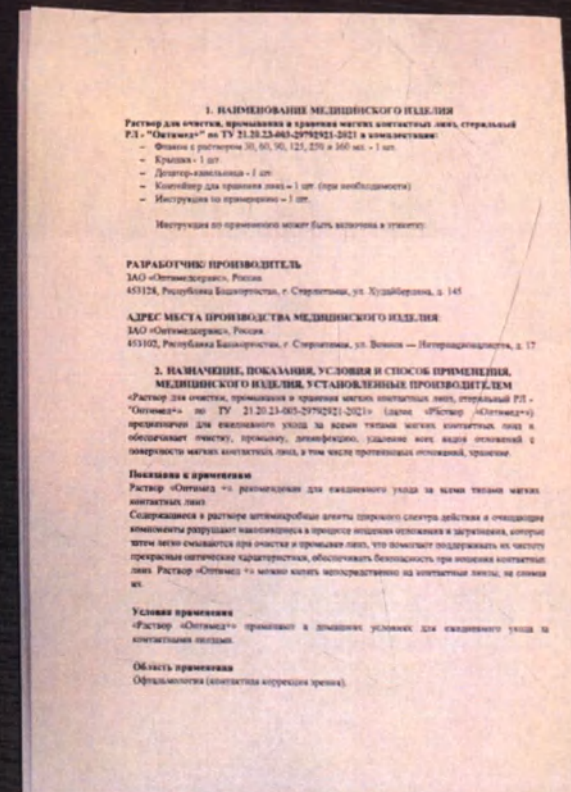

Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимерд+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 (общий вид с этикеткой для флакона 360 мл).



Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ - «Оптимед+» по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021 360 мл.

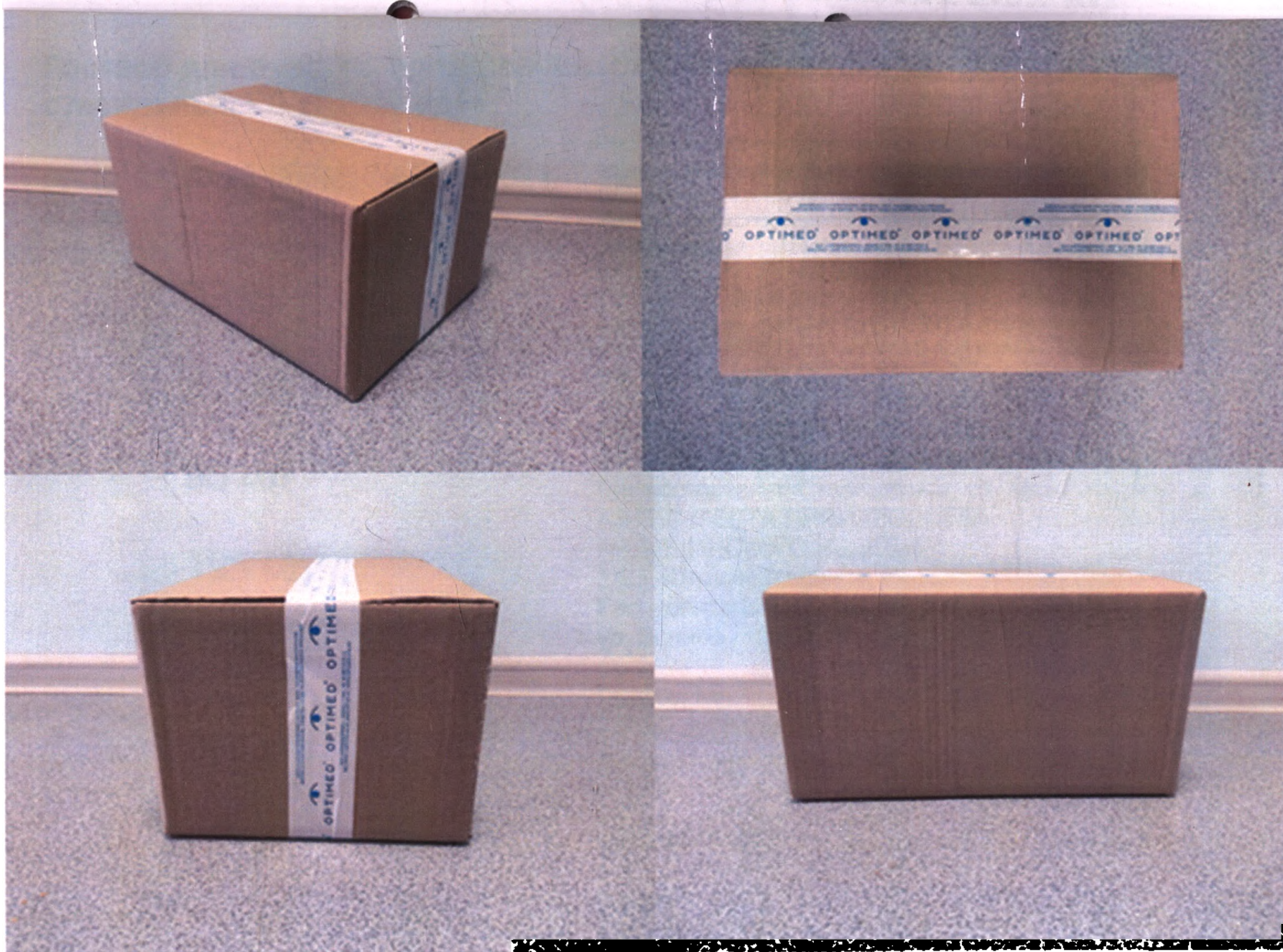

Транспортная упаковка

Раствор для очистки, промывания и хранения мягких контактных линз, стерильный РЛ «Оптимед+»

по ТУ 21.20.23-003-29792921-2021
РУ №

☐ 30 мл

☐ 60 мл

☐ 90 мл

☐ 125 мл

☐ 250 мл

☐ 360 мл

STERILE A

Раствор транспортируют всеми видами крытого транспорта в соответствии правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

Условия транспортирования - температура от + 5°C до + 30 °C и относительная влажность не более 80% при температуре + 25°C.

Условия хранения раствора универсальный в части воздействия климатических факторов должны соответствовать температуре от + 5°C до + 30 °C и относительной влажности не более 80% при температуре + 25°C.

РАЗРАБОТЧИК/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «Оптимедсервис», Россия. 453128, Республика
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 145

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

ЗАО «Оптимедсервис», Россия. 453102,
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов - Интернационалистов, д. 17

Партия №

Количество, шт.:

Дата выпуска:

Годен до:

ЗАО «Оптимедсервис»
Пронумеровано и скреплено печатью
лист 25
Генеральный директор
Б.М. Азнабаев

