


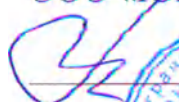

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Юг-Восток»


Э. Е. Ванюшкина
«20» января 2023 г.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Пакеты одноразовые полиэтиленовые «VEMLIFE»
для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов
классов "А, Б, В, Г"
по ТУ 21.20.23-004-06874160-2022**

1. Общие сведения

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Восток» (ООО «Юг-Восток»), ИНН 2722087780

Адрес местонахождения: 680009, Хабаровский край, Г.О. ГОРОД ХАБАРОВСК, Г ХАБАРОВСК, УЛ ДЕМЬЯНА БЕДНОГО, Д. 8Б

Телефон: 8 909 876 65 40 Электронная почта: Ue27@inbox.ru

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Восток» (ООО «Юг-Восток»), ИНН 2722087780

Адрес местонахождения: 680009, Хабаровский край, Г.О. ГОРОД ХАБАРОВСК, Г ХАБАРОВСК, УЛ ДЕМЬЯНА БЕДНОГО, Д. 8Б строние 5

Телефон: 8 909 876 65 40 Электронная почта: Ue27@inbox.ru

Настоящая инструкция по применению распространяется на Пакеты одноразовые полиэтиленовые «VEMLIFE» для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов "А, Б, В, Г" (далее по тексту – изделия), предназначенные для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов А, Б, В, Г в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности при выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур.

2. Описание изделия

Это изделие одноразового использования.

Показания к применению

Необходимость утилизации медицинских отходов класса А, Б, В, Г согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Преимущества изделий одноразового применения:

- удобство в применении;
- выполнение роли гигиенического барьера, для сохранности гигиенических условий;
- экономическая эффективность при применении при прямых затратах и при скрытых затратах при подготовке многоразового белья к применению;
- длительный срок хранения нестерильных одноразовых изделий;
- простота утилизации использованных изделий.

Противопоказания

Отсутствуют.

Потенциальный потребитель – медицинский персонал.

Вид контракта с организмом (телом) человека: Отсутствует. При использовании медицинского изделия обязательно использование перчаток.

Условия эксплуатации (область применения):

В медицинских учреждениях широкого профиля

СТЕРИЛЬНОСТЬ:

Нестерильное изделие, перед использованием не требует стерилизации.

Инструкция по применению

Пакеты одноразовые полиэтиленовые «VEMLIFE» для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов "А, Б, В, Г"

по ТУ 21.20.23-004-06874160-2022

2

Прочее:

Класс в зависимости от степени потенциального риска применения (ГОСТ 31508) – 1 в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н)

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией – 336200 (согласно Приказу Минздрава России №4н.)

Вид климатического исполнения изделий – УХЛ 4.2. по ГОСТ Р 50444/ ГОСТ 15150

Изделия, в зависимости от класса отходов, должны иметь цвет:

белый – для отходов класса А,
желтый – для отходов класса Б,
красный – для отходов класса В,
черный – для отходов класса Г.

Изделия предназначены для одноразового использования.

Классы отходов и их характеристика согласно СанПиН 2.1.3684-21 представлены в таблице 1.

Таблица 1

Класс опасности	Цвет изделия	Характеристика морфологического состава
Класс А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к твердым бытовым отходам)	Белый	отходы, не имеющие контакт с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, в том числе: использованные средства личной гигиены и предметы ухода однократного применения больных неинфекционными заболеваниями; канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства; сметы от уборки территории; пищевые отходы центральных пищеблоков, столовых для работников медицинских организаций, а также структурных подразделений организаций, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность, кроме подразделений инфекционного, в том числе фтизиатрического профиля;
Класс Б (эпидемиологически опасные отходы)	Желтый	отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности, в том числе: материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и (или) другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани); пищевые отходы и материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности;

Инструкция по применению

Пакеты одноразовые полиэтиленовые «VEMILITE» для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов "А, Б, В, Г"

по ТУ 21.20.23-004-06874160-2022

Класс В (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы)	Красный	Отходы от деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 группы патогенности, а также в области использования генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях (эпидемиологически опасные отходы, далее - класс В), в том числе: отходы микробиологических, клинико-диагностических лабораторий; отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3-4 групп патогенности; отходы сырья и продукции от деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, от производства и хранения биомедицинских клеточных продуктов; биологические отходы вивариев; живые вакцины, непригодные к использованию;
Класс Г (токсикологически опасные отходы 1 - 4 классов)	Черный	отходы, не подлежащие последующему использованию (токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности, далее - класс Г), в том числе: ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование; лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфекционные средства; отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения, а также другие токсикологически опасные отходы, образующиеся в процессе осуществления медицинской, фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, при производстве, хранении биомедицинских клеточных продуктов, деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях;

К пакетам при необходимости должны прикладываться принадлежности – стяжки, предназначенные для прочной фиксации пакета с содержимым без возможности открытия пакетов.

Внешний вид изделий (чертеж) приведен в **Приложении А**.

Варианты исполнения изделий приведены в **Приложении Б**

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

3.1 Изделия должны соответствовать требованиям технических условий производителя ООО «Юг-Восток».

3.2 Внешний вид изделий: Изделие прямоугольной формы без ручек с боковыми фальцами или без фальцев, с одним донным швом.

3.3 На поверхности пакетов не должно быть трещин, разрывов и отверстий. Пакеты не должны иметь слипания внутренних поверхностей.

3.4. Пакеты должны иметь одинарный сварной шов шириной не более 10 мм. Шов должен располагаться на расстоянии не более 10 мм от края пакета. Сварные швы пакетов должны быть герметичными, ровными по всей длине, без прожженных мест и складок. Показатель прочности сварных швов пакетов при растяжении должен быть не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении, но не менее 10 МПа.

3.4 Глубина фальца должна быть от 30 до 150 мм с шагом 10 мм.*

* Допустимое отклонение от номинального значения +/-10 мм.

Инструкция по применению

Пакеты одноразовые полиэтиленовые «VEMILE» для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов "А, Б, В, Г"

по ТУ 21.20.23-004-06874160-2022

3.5 Цветная печать, нанесенная на пакет не должна иметь загрязнений, пятен от печатной краски, затрудняющих чтение надписей, отслоение краски.

3.6 Изделия должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по группе УХЛ 4.2. По ГОСТ Р 50444 при эксплуатации, при хранении и транспортировке – по условиям хранения 5 лет по ГОСТ 15150.

3.7 Изделия должны быть изготовлены из материалов, приведенных в **таблице 2**

Таблица 2

Наименование части изделия	Материал, марка, производитель
Пакет	Пленка полиэтиленовая (цвет: белый, желтый, красный, черный), толщина 10-30 мкм по ГОСТ 10354-82 производства ООО "Юг-Восток", Россия
Краситель	Концентрат красителей различных цветов (белый, желтый, красный, черный) торговой марки «НИКАТОР» по ТУ 2243-001-33054488-2015 с изменениями №1), производства ООО «Никатор», Россия

3.8 Технические характеристики материалов указаны в **таблице 3**.

Требования к техническим характеристикам материалов изделий, а также линейные размеры указаны в **таблице 3**.

Таблица 3*

Размеры изделия, мм	Толщина изделия, в мкм	Максимальная нагрузка, в кг
ширина от 300 до 800 мм, длина от 300 мм до 1200 мм	от 10 до 15 мкм	Не более 5 кг
ширина от 300 до 800 мм, длина от 300 мм до 1200 мм	от 16 до 20 мкм	Не более 10 кг
ширина от 300 до 800 мм, длина от 300 мм до 1200 мм	от 21 до 25 мкм	Не более 15 кг
ширина от 300 до 800 мм, длина от 300 мм до 1200 мм	от 26 до 30 мкм	Не более 20 кг

*** Примечание**

1. Масса одного изделия зависит от линейных размеров этого изделия, от вида изделия и поверхностной плотности используемого при его изготовлении материала.
2. Предельные отклонения от номинальной толщины пленки изделия в соответствии с ГОСТ 10354-82 составляют $\pm 20\%$
3. Предельные отклонения по длине и ширине изделия не должны превышать ± 10 мм.

3.9 По функциональным свойствам изделия всех вариантов исполнения должны соответствовать требованиям, указанным в **таблице 5**

Таблица 5

Инструкция по применению

Пакеты одноразовые полиэтиленовые «VEMILIFE» для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов "А, Б, В, Г"

по ТУ 21.20.23-004-06874160-2022

№ п/п	Технические характеристики	Значения/диапазоны
1	Цвет	См. Таблицу 1
2	Текстура	Гладкая или текстурированная
3	Поверхность	Поверхность изделий не имеет разрывов, порезов, загрязненных участков и прочих дефектов.
4	Биологическая безопасность	Соответствие серия стандартов ISO 10993
5	Прочность пленки при растяжении в продольном направлении. Мпа (кгс/куб.см), не менее	12,8/(132)
6	Прочность пленки при растяжении в поперечном направлении. Мпа (кгс/куб.см), не менее	11,76 (120)
7	Прочность сварного шва при разрыве в продольном направлении, в Мпа(кгс/куб.см), не менее	10 (102)
8	Толщина, мкм	См. таблицу 3
9	Грузоподъемность, кг	См. таблицу 3

Нормы допускаемых отклонений по разрывной нагрузке не должны превышать, %:

- 7% - в продольном направлении,
- 10% - в поперечном направлении.

3.9.1 Изделия в транспортной упаковке должны быть устойчивым к воздействию климатических факторов по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150. Критерий предельного состояния – несоответствие пункта 1.1.5 (пункты 5,6)

3.9.2 Средний срок хранения изделий при условиях хранения, указанных в настоящих технических условиях, должен быть не более 5 лет со дня изготовления. Критерий предельного состояния – несоответствие пункта 1.1.5 (пункты 5,6)

3.10 Комплектность

3.10.1 Изделия выпускают в следующей комплектации:

Изделия – упаковка с количеством изделий одного наименования;

В комплект поставки должно входить:

- Изделие варианта исполнения в количестве 10,50 или 100 шт. в потребительской упаковке с маркировкой - 1 уп.
- Стяжка кратно количеству изделий 10,50 или 100 шт.
- Инструкция по применению (эксплуатационный документ) – 1 экз. на групповую/транспортную тару.

Вид эксплуатационного документа устанавливается предприятием-изготовителем.

3.11 Маркировка

Маркировка изделий осуществляется в целях передачи информации, необходимой для их безопасного и правильного использования. Маркировка потребительской тары

3.11.1 Маркировку, характеризующую изделия, наносят непосредственно на изделие, на упаковочный материал потребительской тары, или на этикетку, которую наклеивают на

Инструкция по применению

Пакеты одноразовые полиэтиленовые «VEMLIFE» для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов "А, Б, В, Г"

по ТУ 21.20.23-004-06874160-2022

потребительскую тару, или на листок-вкладыш, вкладываемый в каждую единицу потребительской тары, а также на этикетку групповой упаковки.

3.11.2 Каждое изделие должно иметь следующую маркировку:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- адрес места производства;
- наименование изделия;
- обозначение класса опасности отходов (А, Б, В, Г);
- обозначение настоящих ТУ;
- обозначение СанПиН 2.1.3684;
- информационное окно (см. подпункт А)
- слова «Не превышать установленную производителем нагрузку пакета (указана на этикете)»
- слова «Работать в средствах индивидуальной защиты»;
- слова «Не использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов»;
- слова «Не пересыпать (перегружать) неупакованные отходы в другие пакеты!»;
- слова «Руками не утрубовывать!»;
- слова «После наполнения пакета не более чем на $\frac{3}{4}$ герметизировать пакет стяжками и т.д.»;
- слова «Повторное использование пакетов не допускается»;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- номер и дата сертификата соответствия;
- символ «HDPE (2)»;
- символ «Знак соответствия при декларировании соответствия»
- символ «Знак биологической опасности» (для отходов класса Б, В и Г)

А) Информационное окно.

На каждом пакет должно быть нанесено информационное окно, в котором должно быть указано в табличном виде, для удобства заполнения:

Наименование ЛПУ	
Подразделение ЛПУ	
Ответственное лицо	
Дата сбора	

3.11.3 Каждая групповая упаковка должна иметь следующую маркировку:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- адрес места производства;
- наименование изделия;
- обозначение класса опасности отходов (А, Б, В, Г);
- обозначение настоящих ТУ;
- толщина изделия;
- размер изделия (ширина x длина);
- количество изделий в упаковке;
- максимальная нагрузка, в кг;
- указание на тип пакета (с фальцами или без фальцев);

Инструкция по применению

Пакеты одноразовые полиэтиленовые «АЕМЛНГ» для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов "А, Б, В, Г"

по ТУ 21.20.23-004-06874160-2022

- номер и дата регистрационного удостоверения;
- номер партии;
- дата изготовления (месяц, год)
- средний срок хранения изделий;
- условия хранения;
- утилизация;

3.11.4 Маркировка транспортной тары

Маркировку, характеризующую изделия, наносят непосредственно на транспортную тару или на этикетку, которую наклеивают на транспортную тару.

Маркировка транспортной тары должна содержать следующие сведения.

- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)];
 - товарный знак изготовителя (при наличии);
 - наименование изделий;
 - обозначение класса опасности отходов (А,Б,В,Г),
 - обозначение настоящих технических условий;
 - толщина изделия;
 - размер изделий (ширина х длина);
 - количество единиц потребительской тары и количество изделий в потребительской таре;
 - номер партии;
 - дата изготовления (месяц, год);
 - средний срок хранения изделий;
 - условия хранения;
 - утилизация;

3.11.5 Символы, используемые при маркировке:



-символ «HDPE (2) HDPE» ;



- символ «Знак соответствия при декларировании соответствия»
- символ «Знак биологической опасности» (для отходов класса Б, В и Г)



Инструкция по применению

Пакеты одноразовые полиэтиленовые «УЕМЛПЕ» для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов "А, Б, В, Г"

по ТУ 21.20.23-004-06874160-2022

3.12 Упаковка

Упаковка изделий в потребительскую тару

Изделия упаковывают в следующие виды потребительской тары с соединением краев термическим способом или с помощью клейкой/адгезивной ленты, находящейся на краю упаковочного пакета:

- пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354;

Изделия одного варианта исполнения в количестве 10,50 или 100 штук упаковывают в потребительскую упаковку – в пакет из пленки полиэтиленовой по ГОСТ 12302.

Количество изделий в потребительской таре должно соответствовать количеству, указанному в маркировке.

Если в комплект поставки изделия входят принадлежность - стяжки, то вместе с потребительской упаковкой размещается эквивалентное количество стяжек, упакованных в пакет из полимерных материалов по ГОСТ 12302.

Упаковка изделий в транспортную тару

Транспортная маркировка – по ГОСТ 15150 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги». Допускается наклеивание манипуляционных знаков, выполненных типографским способом.

Изделия одного варианта исполнения, одной даты изготовления, упакованные в потребительскую тару одного вида, упаковывают в следующие виды транспортной тары:

- ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13514 или отечественного производства по нормативно-технической документации;

Если в комплект поставки изделия входят принадлежность - стяжки, то вместе с потребительской упаковкой размещается эквивалентное количество стяжек, упакованных в пакет из полимерных материалов по ГОСТ 12302. Также в комплект поставки входит инструкция по применению изделий – 1 штука на одну транспортную упаковку.

Потребительские упаковки укладывают в транспортную упаковку. Количество изделий в ящике устанавливается договором о поставке.

Транспортная тара должна быть оклеена лентой по ГОСТ 20477

Количество упаковок изделий в транспортной таре может быть кратно вместимости в тару потребительских упаковок, при этом максимальная масса брутто одного места не должна быть более 30 кг.

Максимальные габаритные размеры транспортной упаковки не должны превышать 40х30х30

4 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура воздуха от +10 до +35 С®,

Относительная влажность воздуха от 40 до 80%,

Атмосферное давление от 84,00 до 106,70 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.).

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Инструкция по применению

Пакеты одноразовые полиэтиленовые «VEMIFE» для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов "А, Б, В, Г"

по ТУ 21.20.23-004-06874160-2022

5.1 Изделия при использовании не выделяют вредных веществ, в воздушной среде и в присутствии других веществ не образуют вредных соединений.

5.2 Технологический режим производства изделий должен осуществляться по ГОСТ 12.3.030 с соблюдением правил пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1 В целях исключения загрязнения окружающей среды отходы, образующиеся при изготовлении изделий, должны утилизироваться или перерабатываться во вторичное сырье на предприятии.

6.2 Изделия в процессе применения не наносят вред окружающей среде и не требуют специальных мер защиты окружающей среды.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Изделия транспортируют любым видом крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

Условия транспортирования по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

7.2 В процессе транспортировки следует использовать чистые средства и соблюдать меры предосторожности, во избежание повреждения упаковки, не ставьте тяжелый груз на изделия, не допускайте контакта изделия с острыми предметами.

7.3 Изделия одного наименования, одной даты изготовления, упакованные в потребительскую тару одного вида, упаковывают в следующие виды транспортной тары:

- ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13514 или отечественного производства по нормативно-технической документации;

7.4 Хранение изделий должно производиться при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 75%. Изделия хранят в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.

8.2. Гарантийный срок хранения изделий 5 лет со дня изготовления.

9. МЕТОДЫ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Использованные по назначению пакеты утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21, в зависимости от класса медицинских отходов, для которых они предназначены.

9.2. Неиспользованные изделия, или неиспользованные изделия, с истекшим сроком хранения, изделия с нарушенной целостностью, а также бракованные изделия относятся к эпидемиологически безопасным отходам, приближенным по составу к твердым бытовым отходам (далее -

Инструкция по применению

Пакеты одноразовые полиэтиленовые «VEMILITE» для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов "А, Б, В, Г"

по ТУ 21.20.23-004-06874160-2022

ТБО), не имеющим контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, и должны быть утилизированы по ГОСТ 30772 или как медицинские отходы класса «А» в соответствии СанПиН 2.1.7.2790-10 или как бытовые отходы.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделия имеют полностью законченную конструкцию.

Техническому обслуживанию и ремонту не подлежат.

11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещено использование не по назначению. Запрещено повторное использование.

Запрещено опускать в пакеты острые предметы и то, что потенциально или фактически может нарушить целостность пакета, например, шприцы, иглы, битое стекло, скальпели и т.д.

Использовать для конкретного вида отходов только соответствующий классификации пакет.

Запрещено пересыпать (перегружать) неупакованные отходы классов Б, В и Г из одной емкости в другую. Запрещено утрамбовывать отходы классов Б, В, Г.

Запрещено осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды.

Запрещено смешивание отходов различных классов в общей емкости.

Запрещено устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов.

12. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

12.1 Провести визуальный осмотр потребительской упаковки

12.2 Достать пакет нужного типоразмера и класса опасности из упаковки.

12.3 Расправить его и раскрыть по горловине.

12.4 Руками придать пакету округлую форму.

12.5 Вставить его в подходящую по размеру тару (бак, корзина).

Для фиксации пакета зажмите его края по краю тары. Проверьте, касается ли дно пакета дна тары.

12.6 Заполните пакет на 3/4 отходами выбранного класса опасности, при этом следите за тем, чтобы в пакет не попал острый инструментальный (иглы, лезвия, скальпель и т.д.).

Заполните пустые поля на информационном окне пакета (или бирке), соответствующей классу опасности пакета.

12.7 Соберите края пакета и выпустите из него воздух.

12.8 Перекрутите горловину пакета

12.9 Герметизируйте пакет при помощи стяжки обогнув перекрученную горловину пакета стяжкой и просунув гладкий хвостик стяжки в отверстие в другом ее конце. Теперь пакет готов к транспортировке отходов на территории ЛПУ.

Инструкция по применению

Пакеты одноразовые полиэтиленовые «ТЕМЛИТЕ» для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов «А, Б, В, Г»

по ТУ 21.20.23-004-06874160-2022

ПРИЛОЖЕНИЕ А

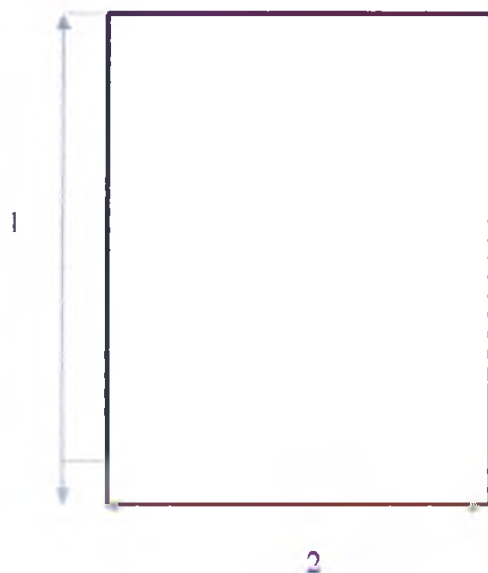


Рисунок 1. Пакет без фальцев

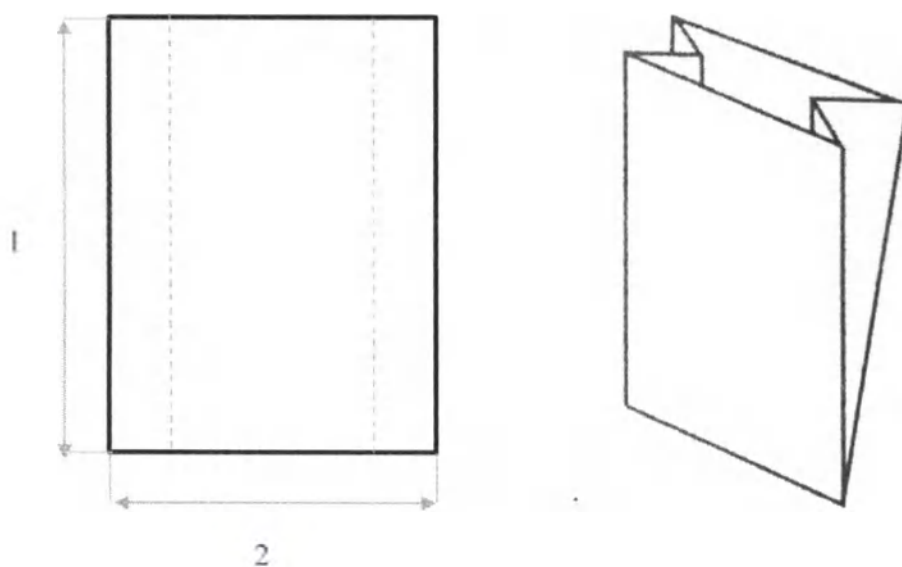


Рисунок 2. Пакет с фальцами

1 – длина изделия
2 – ширина изделия

Инструкция по применению

Пакеты одноразовые полистиленовые «ВЕМЛПЕ» для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов "А, Б, В, Г"

по ТУ 21.20.23-004-06874160-2022

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(Варианты исполнения изделий)

Пакеты одноразовые полиэтиленовые «VEMLIFE» для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов "А, Б, В, Г" По ТУ 21.20.23-004-06874160-2022, в вариантах исполнения:

1. Пакет одноразовый полиэтиленовый «VEMLIFE» для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса А, с фальцами или без фальца (размеры, в мм; ширина от 300 до 800 мм с шагом 10 мм, длина от 300 мм до 1200 мм с шагом 10 мм; толщина, в мкм от 10 до 30 мкм с шагом 5 мкм) – по 10, 50, 100 шт.
2. Пакет одноразовый полиэтиленовый «VEMLIFE» для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Б с фальцами или без фальца (размеры, в мм; ширина от 300 до 800 мм с шагом 10 мм, длина от 300 мм до 1200 мм с шагом 10 мм; толщина, в мкм от 10 до 30 мкм с шагом 5 мкм) – по 10, 50, 100 шт.
3. Пакет одноразовый полиэтиленовый «VEMLIFE» для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса В с фальцами или без фальца (размеры, в мм; ширина от 300 до 800 мм с шагом 10 мм, длина от 300 мм до 1200 мм с шагом 10 мм; толщина, в мкм от 10 до 30 мкм с шагом 5 мкм) – по 10, 50, 100 шт.
4. Пакет одноразовый полиэтиленовый «VEMLIFE» для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Г с фальцами или без фальца (размеры, в мм; ширина от 300 до 800 мм с шагом 10 мм, длина от 300 мм до 1200 мм с шагом 10 мм; толщина, в мкм от 10 до 30 мкм с шагом 5 мкм) – по 10, 50, 100 шт.
5. Принадлежности: стяжки – по 10, 50, 100 шт.
6. Эксплуатационная документация: - инструкция по применению – 1 шт. (на одну транспортную упаковку)

Инструкция по применению

Пакеты одноразовые полиэтиленовые «VEMLIFE» для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов "А, Б, В, Г"

по ТУ 21.20.23-004-06874160-2022

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

13 (тринадцать листов)

листов

Генеральный директор

Ванюшкина Э.Е.

