



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

медицинского изделия

«Жгут кровоостанавливающий силиконовый многоразового использования
по ТУ 21.20.24-110-18037666-2022»

Версия «2» от «15» мая 2023 г.

Назначение:

Жгут предназначен для временной остановки кровотечения при повреждении крупных кровеносных сосудов.

Жгут предназначен для использования в учреждениях здравоохранения, в службах скорой помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицине, мобильных спасательных формирований, в полевых условиях, а также при оказании первой помощи в быту.

Состав и описание изделия:

Жгут выпускается в следующих вариантах исполнения:

ЖКС оливково-зеленый - жгут кровоостанавливающий силиконовый оливково-зеленого цвета многоразового использования;

ЖКС красно-коричневый - жгут кровоостанавливающий силиконовый красно-коричневого цвета многоразового использования;

ЖКСк оливково-зеленый - жгут кровоостанавливающий силиконовый оливково-зеленого цвета многоразового использования с крошкой;

ЖКСк красно-коричневый - жгут кровоостанавливающий силиконовый красно-коричневого цвета многоразового использования с крошкой.

Варианты-исполнения ЖКС и ЖКСк отличий по эксплуатационным и техническим характеристикам не имеют, отличаются только по внешнему виду.

Жгут изготавливается в виде ленты из силиконовой резины.

Жгут выпускается двух цветов: оливково-зеленый и красно-коричневый.

Масса жгута – не более 150 г.

Общий вид и основные размеры жгута приведены в Приложении.

Комплектность:

жгут одного варианта исполнения – 1 шт.

инструкция по применению – 1 экз.

этикетка – 1 экз.

Область применения: Десмургия, экстренное оказание первой медицинской помощи при обильном артериальном или венозном кровотечении.

Способ применения:

Перед применением жгут следует продезинфицировать 3% раствором перекиси водорода. Разместить жгут на одежде или мягкой подкладке чуть выше раны, растянуть

его с максимальным усилием, затем затянуть жгут и сделать несколько оборотов до прекращения кровотечения из раны пострадавшего.

Во избежание травмирования кожных покровов не применять жгут на незащищенной коже!

Наложить следующие витки жгута с меньшим усилием. Проверить пульсацию сосудов, необходимо прощупать пульс ниже места ранения, если он отсутствует, натяжение нормальное. Завязать свободные концы жгута. Вложить записку с указанием даты и времени наложения жгута.

При длительной транспортировке (в тепле – не более 1 часа, а в холоде – через 30 минут) жгут надо постепенно ослабить на несколько минут – до появления на ране капель крови, а затем снова затянуть (чуть выше или ниже прежнего места).

Конечность со жгутом необходимо обязательно иммобилизовать, а в холодное время года утеплить.

ВНИМАНИЕ:

- слабо наложенный жгут не останавливает артериальное кровотечение и создает условия для венозного застоя и усиления кровотечения;
- слишком тугое наложение жгута может привести к повреждению нервных стволов, сдавливанию мышц и сосудов, результатом подобных патологий является паралич конечностей;
- наложение жгута на среднюю треть плеча может привести к травмированию лучевого нерва.

Показания к применению:

- сильное артериальное кровотечение;
- травматическая ампутация;
- синдром длительного сдавливания.

Противопоказания к применению:

- наличие острой инфекции пораженной конечности;
- наличие атеросклероза артерий;
- детский возраст до 3 лет.

Возможные побочные явления (осложнения):

- сильно затянутый жгут грозит некрозом конечностей;
- наложение жгута на кожу приведет к ее повреждению.

Транспортирование и хранение:

Транспортирование должно производиться при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха не более 98 %.

Хранение должно производиться в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 98 %. Жгут должен храниться на стеллажах и должен быть защищен от прямого солнечного света, ультрафиолетового излучения и попадания влаги на упаковку. Не допускается хранение вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с кислотами, щелочами, маслами, бензином и другими органическими растворителями.

Условия эксплуатации:

Эксплуатация жгута производится при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха не более 98 %.

Указания по эксплуатации:

- перед применением жгут должен быть продезинфицирован по МУ 287-113 двухкратным протиранием салфеткой из бязи или марли, смоченной в 3% растворе перекиси водорода по ГОСТ 177.;
- должны быть приняты меры защиты жгута от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями.

Гарантия изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие жгута требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок годности:

Срок годности - 5 лет с даты изготовления.

Не применять после истечения срока годности.

Длительность применения:

Кратковременный контакт с неповрежденными кожными покровами (менее 24 часов).

Сведения о стерилизации:

Жгут поставляется в **нестерильном виде**.

Очистка и дезинфекция:

Очистку и дезинфекцию химическим методом проводят по МУ 287-113.

Перед применением неиспользованный жгут должен быть продезинфицирован двухкратным протиранием салфеткой из бязи или марли, смоченной в 3% растворе перекиси водорода.

Жгут после использования должен быть подвергнут очистке (проточной водой) и дезинфекции (3% раствором перекиси водорода).

Жгут устойчив к многократной дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177. Количество циклов дезинфекции – 5.

Сведения об утилизации:

Утилизация неиспользованных жгутов с истекшим сроком годности должна проводиться по СанПин 2.1.3684 (раздел X), как отходы класса А. Утилизация использованных жгутов, непригодных к дальнейшей эксплуатации должна проводиться по СанПин 2.1.3684 (раздел X), как отходы класса Б.

Меры предосторожности:

Перед эксплуатацией жгута необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

Медицинское изделие нетоксично, не содержит лекарственных средства, биологические материалы и (или) наноматериалы, и (или) материалы животного происхождения.


При выявлении нежелательных событий, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента), связанного с использованием медицинского изделия, просьба направлять сообщения производителю.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2022/18696 от 28.10.2022 г.

Изготовитель: Акционерное общество «МедСил» (АО «МедСил»)

Адрес изготовителя: Россия, 141018, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 41А, пом. II/1, телефон: +7 (495) 583-36-62, электронная почта: info@medsil.ru

Адрес производства: Россия, 141336, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24

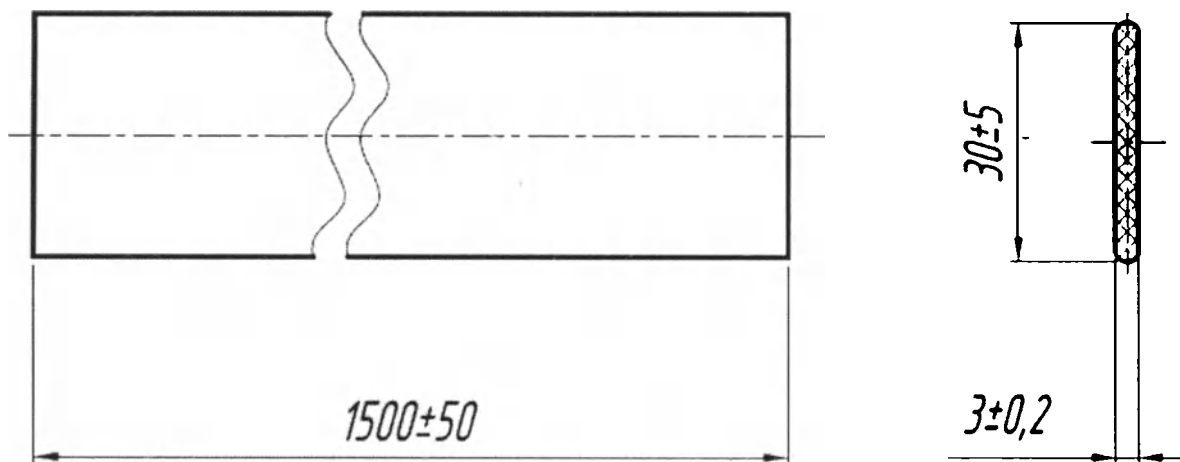

Варианты исполнения жгута	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
ЖКС	1500 ± 50	30 ± 5	$3 \pm 0,2$
ЖКСк	1500 ± 50	30 ± 5	$3 \pm 0,2$

Рисунок 1 - Жгут кровоостанавливающий силиконовый
многоразового использования

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
4 листов (а)

(сметка)

Генеральный директор
АО «МедСил»
Д. Э. Егерев

