

ОКП 93 9330

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Интра»



/Сабурова Е. А./

«01» декабря 2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри INTRARICH

**(исполнение: пластырь INTRARICH COOL, пластырь INTRARICH HOT)
производства Icure Pharmaceutical Inc., Республика Корея**

2009

Производитель: Icube Pharmaceutical Inc. (Икурэ Фармасьютикал Инк.)

Адрес производства: 221-4, Sinnung-ri, Seowoon-myun, Ansung-si, Gyeonggi-do, 456-853, Korea

(221-4, Синнунг-ри, Сеовун-мюун, Ансунг-си, Гьенги-до, 456-853, Корея)

Продукция: пластырь INTRARICH HOT, пластырь INTRARICH COOL

Область применения изделия:

Пластырь INTRARICH HOT предназначен для облегчения симптомов при мышечных болях; применяется при ушибах, болях после травм.

Пластырь INTRARICH COOL применяется при ушибах, опухолях и болях после травм, синдроме «теннис-локтя».

Состав:

1. Пластырь INTRARICH HOT

Текстильная часть: нетканое полотно

Клейкая часть: резиновый клей

Пропитка: гликоль салицилат- 35,028 мг/ 70 кв.см., Л-ментол- 35,028 мг/70 кв.см, отдушка (ванилиновый бутиловый эфир, настой перца)-0,013%

Вес: 2,400 г. Размеры одной пластины: 7x10 см

2. Пластырь INTRARICH COOL

Текстильная часть: нетканое полотно

Клейкая часть: резиновый клей

Пропитка: гликоль салицилат- 35,028 мг/ 70 кв.см., Л-ментол- 35,028 мг/ 70 кв.см, отдушка (ванилиновый бутиловый эфир)-0,013%

Вес: 2,400 г. Размеры одной пластины: 7x10 см

Описание изделия:

Пластыри INTRARICH состоят из трикотажного полотна, покрытого бесцветной или бледно- желтой прозрачной адгезивной пастой, которая защищена снимающейся пленкой.

Инструкция по применению:

Перед использованием пластыря необходимо снять защитную пленку с пластыря, наклеить на больной участок. Процедуру можно проводить 1-2 раза в день.

1. Применять на чистой сухой коже.

2. Не использовать:

- в течение долгого периода на одном участке кожи;
- избегать контакта с глазами, ушами, слизистой рта и носа;

3. После применения необходимо вымыть руки.

4. Не применять после истечения срока годности

Противопоказания:

Нарушение целостности кожных покровов, индивидуальная непереносимость.

Общие предупреждения:

Осторожно при бронхиальной астме, лечении противовоспалительными анальгетиками и противогрибковыми препаратами, при инфекционных воспалениях.

Побочные действия:

Покраснения, сыпь, зуд, сухость кожи, редко: воспаление кожи, аллергические реакции, анафилактическая реакция (крапивница, одышка). Если проявились данные симптомы, необходимо прекратить применение пластыря.

Срок годности: 3 года со дня производства

Хранение: в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте.

Условия отпуска: без рецепта

Пронумеровано, прошнуровано

3 (три) листов

Генеральный директор
ООО «Интра»
Сабурова Е. А.

