



Утверждаю
Директор ФГУП «Ульяновское ПрОП»
Минздравсоцразвития России
В.Г. Чуйков

Руководство по эксплуатации распорки детской «Стремена Павлика» ПИО-35

Распорку надевают в лежачем положении, грудной пояс, пересекающий за спину ребенка, накладывается на уровне сосков - чтобы не натирал под мышками. На ремнях имеются просечки для возможности регулировок обхвата груди и нижних конечностей. Пояс плотно прилегает к телу, ножные части для удержания стоп и голени фиксируются с помощью застежки текстильной «контакт».

В положении стоя проверить удобство размещения ног в распорке, сопряженность движений.

При нагрузке обеспечивает удобство пользования, надевания и снятия, не оказывает избыточного давления на кожные покровы ребенка, при его появлении необходимо прекратить пользоваться распорками и обратиться на предприятие-изготовитель.

Самостоятельный ремонт изделия запрещен.

Пользоваться неисправными распорками противопоказано.

Обработку проводить методом двукратной протирки поверхностей распорок 3% раствором перекиси водорода с добавлением синтетических моющих средств. Интервал между протирками 10-15 минут. После протирки поверхности изделия вытирают насухо чистой салфеткой.. При этом внешний вид и размеры распорок не должны изменяться.

Не следует хранить изделие вблизи источника тепла.

Инженер-технолог

М.С. Айзатуллова