

Утверждаю
Директор ФГУП «Ульяновское ПрОП»
Минздравсоцразвития России

В.А. Чуйков



Руководство по эксплуатации
тутора на голеностопный сустав ТН0-02

Тутор на голеностопный сустав предназначен для коррекции патологических установок и деформаций в голеностопном суставе.

Тутор предназначен для пользования в условиях повседневной жизни (в покое и при ходьбе).

Надевание и пользование.

1. Тутор надевают на конечность в положении «сидя» или «лежа» поверх чулка.
2. Корректируемую конечность помещают в гильзу тутора и плотно фиксируют креплениями снизу вверх. Гильза тутора не оказывает болезненного давления на костные выступы и мышечные ткани в зафиксированном положении.

Уход за тутором.

1. Внутреннюю поверхность тутора следует протирать 2-3 раза в неделю намыленной влажной тканью с последующей просушкой.
2. Не следует хранить тутор вблизи отопительных приборов и открытого огня.

Уход за конечностью.

Проводить гигиеническую обработку кожных покровов, не реже двух раз в сутки, теплым мыльным раствором, салициловым спиртом, с последующим массажем всей конечности.

Ремонт тутора.

1. Запрещается самостоятельно ремонтировать тутор.
3. При выходе из строя необходимо обратиться на протезно-ортопедическое предприятие, выдавшее тутор.

Инженер-технолог

М.С. Айзатуллова

М.С. Айзатуллова