



**ANITA Dr. Helbig GmbH**  
**Grafenstrasse 23**  
**83098, Brannenburg**

**Johannes Weber-Unger**  
**Member of the executive board**

**19.12.2022**

**User manual**

**Version 1.1. Change date 19.12.2022**

**Bra medical postoperative,**  
**models 1199, 4705X, 4706X, 4723X, 4787X, 5300X, 5301X, 5315X,**  
**5322X, 5349X, 5398X, 5706X, 5712X, 5722X, 5726X, 5727X, 5749X,**  
**5750X, 5751X, 5752X, 5754X, 5763X, 5765X, 5768X, 5769X, 5776X,**  
**5782X, 5792X**

**Manufacturer : Anita Dr. Helbig GmbH**  
**Grafenstrasse 23, 83098, Brannenburg, Germany**

**2022**

**User manual**  
**Version 1.1. Change date 19.12.2022**

**CURRENT VERSION.**

**Bra medical postoperative,**  
**models 1199, 4705X, 4706X, 4723X, 4787X, 5300X, 5301X, 5315X,**  
**5322X, 5349X, 5398X, 5706X, 5712X, 5722X, 5726X, 5727X, 5749X, 5750X,**  
**5751X, 5752X, 5754X, 5763X, 5765X, 5768X, 5769X, 5776X, 5782X, 5792X**  
(hereinafter referred to as bra(s), item(s))

**Please read this instruction manual carefully before using this product and keep it for future reference!**

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

### **READ THE OPERATING MANUAL BEFORE USING THE PRODUCT**

#### **WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR USE:**

- Do not use the product if it is damaged.
- For the correct selection of the product, you need to contact a specialist.

## CONTENT

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Introduction                                                                | 5  |
| 1 Name, purpose and contraindications                                       | 6  |
| 2 General description of the bra                                            | 7  |
| 3 Design features and appearance of the bra                                 | 8  |
| 4 Specifications                                                            | 25 |
| 5 Materials used in manufacturing                                           | 35 |
| 6 Using a bra                                                               | 38 |
| 7 Rules for care and cleaning                                               | 39 |
| 8 Marking                                                                   | 40 |
| 9 Packaging                                                                 | 44 |
| 10 Safety requirements and environmental protection                         | 45 |
| 11 Transport and storage                                                    | 46 |
| 12 Maintenance and repair                                                   | 47 |
| 13 Disposal information                                                     | 48 |
| 14 Manufacturer's warranties                                                | 49 |
| 15 Claim information                                                        | 51 |
| List of regulatory documents used by the manufacturer to confirm compliance | 52 |

## INTRODUCTION

The main purpose of the instruction manual is to provide the user with instructions for using the bra, as well as information regarding cleaning it. The guide provides bra performance, cleaning, and safety information. Before use, the user must carefully read the instructions for use in order to use the bra correctly and accurately, while achieving the specified safety and performance standards.

## 1 PURPOSE AND CONTRAINDICATIONS

Bra medical postoperative, models 1199, 4705X, 4706X, 4723X, 4787X, 5300X, 5301X, 5315X, 5322X, 5349X, 5398X, 5706X, 5712X, 5722X, 5726X, 5727X, 5749X, 5750X, 5751X, 5752X, 5754X, 5763X, 5765X, 5768X, 5769X, 5776X, 5782X, 5792X is designed to be worn and to support and/or shape breasts after surgery.

**Scope :** in hospitals and clinics, as well as at home (domestic) conditions .

**Intended user:** patients after mastectomy, mammoplasty, mastopexy, breast lipofilling, plastic surgery, removal and replacement of breast implants.

### **Indications for use:**

- after mastectomy;
- after mammoplasty;
- after mastopexy;
- after breast lipofilling;
- care and recovery after plastic surgery;
- after removal and replacement of breast implants.

### **Contraindications for use:**

- individual intolerance to the materials used in the manufacture of bras.

### **Possible complications:**

- rubbing of the skin .

### **Possible side effects:**

- an allergic reaction to the materials used in the manufacture of bras.

**ATTENTION!!! Bras are not intended for fixation and fastening of exoprostheses!!!!**

**Risk assessment:** The product is designed and manufactured in such a way that, when used under conditions and for purposes consistent with the intended use, determined by the user as the intended user, in strict accordance with the indicated indications, contraindications, side effects, acts as intended and is safe for the user and third parties. individuals (Risk Management File F MDR - A - II -5 from 05/25/2021).

Any risk associated with their use is acceptable when weighed against the benefit to the user (Risk Management File F MDR - A - II -5 from 05/25/2021).

## **2 GENERAL DESCRIPTION OF THE BRA**

The bra consists of shoulder straps, a bowl and a fastener.

Depending on the model, the closure is equipped with eyelet hooks, buttons, snap/velcro or zipper.

Bowls can be seamless molded or stitched.

The clasp can be in front or behind the bra.

### 3 DESIGN FEATURES AND APPEARANCE OF THE BRA

#### DESIGN FEATURES AND APPEARANCE OF THE BRA

##### 3.1 Medical postoperative bra, model 1199



*Figure 1. Appearance of the medical postoperative bra model 1199*

The bra consists of shoulder straps, cup and front fastener. The bra supports and improves the healing process, reduces bruising, swelling or bleeding.

It is made of breathable material and thanks to its mesh structure ensures breathability. The bowls are double-layered, so there are no pressure marks in the scar area. The microfiber interior wicks away moisture and wicks it away. The outer mesh structure allows moisture to evaporate quickly. The straps are smoothly adjustable. In addition, the front closure has two rows of hooks and eyelets for greater circumferential flexibility. The back is made of stretchy airy mesh with especially strong lycra.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

Molded bowls.

##### 3.2 Medical postoperative bra, model 4705X



*Figure 2. Appearance of the medical postoperative bra model 4705X*

Floral lace bra with cup cutouts. Consists of shoulder straps, bowl and back fastener.

The outer part of the bowl is made of stretch lace, covered with fine tulle, with cutouts. The inner part of the bowl is made of soft, but durable foam.

Neckline with soft elastic band.

The bra has insert pockets on both sides.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.



### 3.3 Medical postoperative bra, model 4706X



*Figure 3. Appearance of the medical postoperative bra model 4706X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

Insert pockets on both sides.

The straps are elastic and adjustable at the front.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.4 Medical postoperative bra, model 4723X



*Figure 4. Appearance of the medical postoperative bra model 4723X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

The bowls are divided into four parts with a transverse seam.

Cupped bottom, interlocked bra sides covered with oversized voile.

Cup top in stretch tulle embroidery.

Insert pockets on both sides.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.5 Medical postoperative bra, model 4787X



*Figure 5. Appearance of the medical postoperative bra model 4787X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.6 Medical postoperative bra, model 5300X



*Figure 6. Appearance of the medical postoperative bra model 5300X*

Insert pockets on both sides.

Breathable microfiber bra - quick dry.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The straps are additionally reinforced in the shoulder area.

### 3.7 Medical postoperative bra, model 5301X



*Figure 7. Appearance of the medical postoperative bra model 5301X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

Insert pockets on both sides.

### 3.8 Medical postoperative bra, model 5315X



*Figure 8. Appearance of the medical postoperative bra model 5315X*

The bra consists of shoulder straps, cup and front fastener. The front closure has two buttons and a flat button/velcro.

Insert pockets on both sides.

Skin-friendly elastic cotton.

Soft bands at the arm, bust and décolleté

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.9 Medical postoperative bra, model 5322X



*Figure 9. Appearance of the medical postoperative bra model 5322X*

The bra consists of shoulder straps, cup and front fastener. The front closure has one row of hooks and eyelets.

Insert pockets on both sides

The design of the bra includes a wide elasticated terry waistband.

Particularly soft terry cloth smudge on the hook tape of the front closure.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.10 Medical postoperative bra, model 5349X



*Figure 10. Appearance of the medical postoperative bra model 5349X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

Insert pockets on both sides in pleasant cotton material.

Wide comfortable straps.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.11 Medical postoperative bra, model 5398X



*Figure 11. Appearance of the medical postoperative bra model 5398X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

Insert pockets on both sides.

The straps are elastic and adjustable at the front.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.12 Medical postoperative bra, model 5706X



*Figure 12. Appearance of the medical postoperative bra model 5706X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

Insert pockets on both sides in soft, breathable tulle.

The straps are permanently soft and serve to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

The back of the bra is reinforced.

### 3.13 Medical postoperative bra, model 5712X



*Figure 13. Appearance of the medical postoperative bra model 5712X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

Insert pockets on both sides.

Built-in bust support for larger sizes.

Soft foam backing with microfiber shell.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.14 Medical postoperative bra, model 5722X



*Figure 14. Appearance of the medical postoperative bra model 5722X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

Insert pockets on both sides.

The design of the bra includes a wide elasticated terry waistband.

The straps are soft, covered with terry cloth and serve to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.15 Medical postoperative bra, model 5726X



*Figure 15. Appearance of the medical postoperative bra model 5726X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

Insert pockets on both sides.

Seamless pre-formed bowls in soft microfiber.

The side back of the bra is double layered without a side seam.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.16 Medical postoperative bra, model 5727X



*Figure 16. Appearance of the medical postoperative bra model 5727X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

Insert pockets on both sides.

The outer part of the bowl is made of three parts made of elastic materials.

The back of the bra has a functional mesh cutout that allows air to pass through.

Soft and ergonomic shoulder straps provide high wearing comfort and prevent slipping off the shoulder.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.17 Medical postoperative bra, model 5749X



*Figure 17. Appearance of the medical postoperative bra model 5749X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

Insert pockets on both sides in pleasant cotton material.

Narrow individually adjustable shoulder straps.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.18 Medical postoperative bra, model 5750X



*Figure 18. Appearance of the medical postoperative bra model 5750X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

Insert pockets on both sides in soft stretch tulle.

Three-piece bowls made from durable, breathable jacquard.

Comfortable straps embellished with narrow ribbons.

The back of the bra is made of durable, breathable material.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.



### 3.19 Medical postoperative bra, model 5751X



*Figure 19. Appearance of the medical postoperative bra model 5751X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

Three-piece stitched bowls.

Optically separated diaphragm that visually reduces the neckline.

Insert pockets on both sides.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.20 Medical postoperative bra, model 5752X



*Figure 20. Appearance of the medical postoperative bra model 5752X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

Seamless pre-formed soft bowls.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.21 Medical postoperative bra, model 5754X



*Figure 21. Appearance of the medical postoperative bra model 5754X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.22 Medical postoperative bra, model 5763X



*Figure 22. Appearance of the medical postoperative bra model 5763X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

Elastic material combined with thin functional.

Insert pockets in soft, skin-friendly cotton at the bottom of the bowls and tulle at the top of the bowls.

Semi-transparent overlay.

Shoulder straps are additionally equipped with a pleasant overlay.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.23 Medical postoperative bra, model 5765X



*Figure 23. Appearance of the medical postoperative bra model 5765X*

The bra consists of shoulder straps, cup and front fastener. The front closure features a zipper and a hook for easy zipper closure.

Bra construction includes removable foam cups that are durable and pre-molded.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.24 Medical postoperative bra, model 5768X



*Figure 24. Appearance of the medical postoperative bra model 5768X*

The bra consists of shoulder straps, cup and front fastener. The front closure features a zipper and a hook for easy zipper closure.

Bra construction includes removable foam cups that are durable and pre-molded.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.25 Medical postoperative bra, model 5769X



*Figure 25. Appearance of the medical postoperative bra model 5769X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

Bra construction includes removable foam cups that are durable and pre-molded.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.26 Medical postoperative bra, model 5776X



*Figure 26. Appearance of the medical postoperative bra model 5776X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

The outer surface of the bowl is covered with floral lace.

Decorative ribbon on the neckline.

Insert pockets on both sides.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.27 Medical postoperative bra, model 5782X



*Figure 27. Appearance of the medical postoperative bra model 5782X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

Elastic lace at the top of the cup, with an elastic band for the neckline.

Insert pockets on both sides.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

### 3.28 Medical postoperative bra, model 5792X



*Figure 28. Appearance of the medical postoperative bra model 5792X*

The bra consists of straps, a cup and a back fastener.

Insert pockets in skin-friendly cotton.

Lightweight elastic straps.

Straps are used to hold the product on the shoulders. The clasp is used to fix the product on the body.

## CONTENTS OF DELIVERY:

Postoperative medical bra, model 1199, consisting of:

- 1) Medical postoperative bra, model 1199, size: 70/75/80/85/90/95/100/105 - A / B / C / D / E or 110/115 - A / B / C - 1 pc;
- 2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 4705X, consisting of:

- 1) Medical postoperative bra, model 4705 X , size: 70/75/80 - A / B / C / D / E or 85 - A / B / C / D or 90 - A / B / C - 1 pc;
- 2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 4706X, consisting of:

- 1) Medical postoperative bra, model 4706 X , size: 70/75/80/85 - AA / A / B / C / D / E / F or 90 - AA / A / B / C / D / E or 95 / 100 - AA / A / B / C / D - 1 pc;
- 2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 4723X, consisting of:

- 1) Medical postoperative bra, model 4723 X , size: 75/80/85/90/95/100 - B / C / D / E / F or 105/110 - B / C / D - 1 pc;
- 2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 4787X, consisting of:

- 1) Postoperative medical bra, model 4787 X , size: 75/80/85/90/95 - A / B / C / D - 1 pc;
- 2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5300X, consisting of:

- 1) Medical postoperative bra, model 5300 X , size: 70/75/80/85/90 - A / B / C / D / E - 1 pc;
- 2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5301X, consisting of:

- 1) Medical postoperative bra, model 5301 X , size: 70/75/80/85/90 - A / B / C / D / E or 95 - A / B / C / D - 1 pc;
- 2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5315X, consisting of:

- 1) Medical postoperative bra, model 5315 X , size: 75/80/85/90/95/100 - A / B / C / D or 105/110/115 - A / B / C - 1 pc;
- 2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5322X, consisting of:

- 1) Medical postoperative bra, model 5322 X , size: 70/75/80/85/90/95/100 - A / B / C / D or 105/110/115 - A / B / C - 1 pc;
- 2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5349X, consisting of:

- 1) Medical postoperative bra, model 5349 X , size: 75/80/85/90/95/100 - A / B / C / D / E / F / G or 105/110/115 - A / B / C / D - 1 piece;
- 2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5398X, consisting of:  
1) Medical postoperative bra, model 5398 X , size: 60/65 - B or 70/75/80/85/90/95 - A / B / C - 1 pc;  
2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5706X, consisting of:  
1) Medical postoperative bra, model 5706 X , size: 70/75/80/85 - AA / A / B / C / D / E / F or 90 - AA / A / B / C / D / E or 95 / 100 - AA / A / B / C / D - 1 pc;  
2) Instruction manual - 1 pc.

Medical postoperative bra, model 5712X, consisting of:  
1) Medical postoperative bra, model 5712 X , size: 75/80/85/90/95/100 - A / B / C / D / E - 1 pc;  
2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5722X, consisting of:  
1) Medical postoperative bra, model 5722 X , size: 70/75/80/85/90/95/100 - A / B / C / D or 105/110/115 - A / B / C - 1 pc;  
2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5726X, consisting of:  
1) Medical postoperative bra, model 5726 X , size: 75/80/85/90 - AA / A / B / C / D or 95 - AA / A / B / C or 100/105/110 - AA / A / B - 1 piece;  
2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5727X, consisting of:  
1) Postoperative medical bra, model 5727 X , size: 75/80/85/90/95 - B / C / D / E - 1 pc;  
2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5749X, consisting of:  
1) Medical postoperative bra, model 5749 X , size: 75/80/85/90/95/100 - A / B / C / D / E / F or 105/110/115 - A / B / C / D - 1 PC;  
2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5750X, consisting of:  
1) Medical postoperative bra, model 5750 X , size: 75/80/85/90/95/100/105 - A / B / C / D / E - 1 pc;  
2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5751X, consisting of:  
1) Postoperative medical bra, model 5751 X , size: 75/80/85/90/95 - AA / A / B / C / D - 1 pc;  
2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5752X, consisting of:  
1) Postoperative medical bra, model 5752 X , size: 75/80/85/90 - A / B / C - 1 pc;  
2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5754X, consisting of:  
1) Medical postoperative bra, model 5754 X , size: 75/80/85/90 - A / B / C / D / E or 95 - A / B / C / D - 1 pc;

2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5763X, consisting of:

1) Postoperative medical bra, model 5763 X , size: 75/80/85/90/95/100 - A / B / C / D / E / F or 105/110/115 - A / B / C / D - 1 PC;

2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5765X, consisting of:

1) Medical postoperative bra, model 5765 X , size: XS / S / M / L / XL / XXL - A / B / C / D - 1 pc;

2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5768X, consisting of:

1) Postoperative medical bra, model 5768 X , size: S / M / L / XL - 1 pc;

2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5769X, consisting of:

1) Postoperative medical bra, model 5769 X , size: S / M / L / XL / XXL - 1 pc;

2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5776X, consisting of:

1) Medical postoperative bra, model 5776 X , size: 70/75/80/85/90/95 - AA / A / B / C / D - 1 pc;

2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5782X, consisting of:

1) Postoperative medical bra, model 5782 X , size: 75/80/85/90/95 - A / B / C / D / E - 1 pc;

2) Instruction manual - 1 pc.

Postoperative medical bra, model 5792X, consisting of:

1) Postoperative medical bra, model 5792 X , size: 70/75/80/85/90/95 - B / C / D - 1 pc;

2) Instruction manual - 1 pc.



#### 4 TECHNICAL DATA

The operational and technical characteristics of bras correspond to table 1.

Bras are suitable for use at temperatures from  $-30^{\circ}\text{C}$  to  $+50^{\circ}\text{C}$ , relative humidity up to 85% and atmospheric pressure from 70 to 106 kPa.

Bras are resistant to repeated cleaning: washing using detergents in the ways indicated in the operational documentation.

The bras are made without underwire.

**The breathability of bras should be  $350 \pm 150 \text{ dm}^3/\text{m}^2 \text{ s}$ . (Breathability is determined on point samples of a bra, size  $80 \times 80 \pm 10 \text{ mm}$ )**

**Air permeability test method:**

**Determination of air permeability on the device brand ATL-2 (FF-12)**

**The test is carried out at a vacuum under a spot test equal to 49 Pa (5 mm of water column). It is allowed to test at a vacuum from 0 to 1960 Pa (200 mm of water column).**

**An interchangeable table with an opening of  $10 \text{ cm}^2$  is used for the test. If necessary, tables with other holes can be used.**

**When testing spot tissue samples on a table with an opening area of  $10 \text{ cm}^2$ , the rotameter is selected with a scale of  $120\text{-}1200 \text{ dm}^3/\text{h}$ .**

**A spot tissue sample is placed on the table in a straightened form without skew, face up and pressed against the table with a ring using a lever. At the same time, the installation of the clamping surface of this ring in a horizontal position is monitored.**

**The toggle switch turns on the electric fan. At the same time, the signal lamp lights up and the illumination of the rotameters turns on.**

**By turning the handle counterclockwise, the selected rotameter is opened.**

**Set the vacuum under the spot test. To do this, smoothly open the needle valve by turning the handle clockwise until the meniscus moves one or two divisions above the required mark, then, turning the handle in the opposite direction, set the meniscus to the required risk. If the rotameter float oscillates up and down, it is necessary to turn the needle valve handle more slowly and smoothly.**

**The air flow reading is taken at a set vacuum under a point test to the upper plane of the rotameter float, and the rotameter readings are read with an accuracy of half the rotameter division value.**


**Close the rotameter and needle valve.**

Service life - 10 years.

Table 1

| Bra model name                                                                               | Parameter name and value                  |           |           |                |                 |                                    |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                              | Product size around the circumference, cm | bowl size | Weight, g | Форма          |                 |                                    |                                 |
|                                                                                              |                                           |           |           | Insert pockets | bowls           | Adjustable / non-adjustable straps | Removable / non-removable bowls |
| 1                                                                                            | 2                                         | 3         | 6         | 7              | 8               | 9                                  | 10                              |
| <br>1199    | 70                                        | A/B/C/D/E | 100       | Missing        | Seamless molded | Adjustable                         | fixed                           |
|                                                                                              | 75                                        | A/B/C/D/E |           |                |                 |                                    |                                 |
|                                                                                              | 80                                        | A/B/C/D/E |           |                |                 |                                    |                                 |
|                                                                                              | 85                                        | A/B/C/D/E |           |                |                 |                                    |                                 |
|                                                                                              | 90                                        | A/B/C/D/E |           |                |                 |                                    |                                 |
|                                                                                              | 95                                        | A/B/C/D/E |           |                |                 |                                    |                                 |
|                                                                                              | 100                                       | A/B/C/D/E |           |                |                 |                                    |                                 |
|                                                                                              | 105                                       | A/B/C/D/E |           |                |                 |                                    |                                 |
|                                                                                              | 110                                       | A/B/C     |           |                |                 |                                    |                                 |
|                                                                                              | 115                                       | A/B/C     |           |                |                 |                                    |                                 |
| <br>4705X | 70                                        | A/B/C/D/E | 71        | At both sides  | stitched        | Adjustable                         | fixed                           |
|                                                                                              | 75                                        | A/B/C/D/E |           |                |                 |                                    |                                 |
|                                                                                              | 80                                        | A/B/C/D/E |           |                |                 |                                    |                                 |
|                                                                                              | 85                                        | A/B/C/D   |           |                |                 |                                    |                                 |
|                                                                                              | 90                                        | A/B/C     |           |                |                 |                                    |                                 |

|                                                                                              |     |                |    |               |                    |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----|---------------|--------------------|------------|-------|
| <br>4706X   | 70  | AA/A/B/C/D/E/F | 71 | At both sides | Seamless<br>molded | Adjustable | fixed |
|                                                                                              | 75  | AA/A/B/C/D/E/F |    |               |                    |            |       |
|                                                                                              | 80  | AA/A/B/C/D/E/F |    |               |                    |            |       |
|                                                                                              | 85  | AA/A/B/C/D/E/F |    |               |                    |            |       |
|                                                                                              | 90  | AA/A/B/C/D/E   |    |               |                    |            |       |
|                                                                                              | 95  | AA/A/B/C/D     |    |               |                    |            |       |
|                                                                                              | 100 | AA/A/B/C/D     |    |               |                    |            |       |
| <br>4723X   | 75  | B/C/D/E/F      | 71 | At both sides | stitched           | Adjustable | fixed |
|                                                                                              | 80  | B/C/D/E/F      |    |               |                    |            |       |
|                                                                                              | 85  | B/C/D/E/F      |    |               |                    |            |       |
|                                                                                              | 90  | B/C/D/E/F      |    |               |                    |            |       |
|                                                                                              | 95  | B/C/D/E/F      |    |               |                    |            |       |
|                                                                                              | 100 | B/C/D/E/F      |    |               |                    |            |       |
|                                                                                              | 105 | B/C/D          |    |               |                    |            |       |
| <br>4787X | 75  | A/B/C/D        | 71 | At both sides | Seamless<br>molded | Adjustable | fixed |
|                                                                                              | 80  | A/B/C/D        |    |               |                    |            |       |
|                                                                                              | 85  | A/B/C/D        |    |               |                    |            |       |
|                                                                                              | 90  | A/B/C/D        |    |               |                    |            |       |
|                                                                                              | 95  | A/B/C/D        |    |               |                    |            |       |
| <br>5300X | 70  | A/B/C/D/E      | 80 | At both sides | Seamless<br>molded | Adjustable | fixed |
|                                                                                              | 75  | A/B/C/D/E      |    |               |                    |            |       |
|                                                                                              | 80  | A/B/C/D/E      |    |               |                    |            |       |
|                                                                                              | 85  | A/B/C/D/E      |    |               |                    |            |       |
|                                                                                              | 90  | A/B/C/D/E      |    |               |                    |            |       |
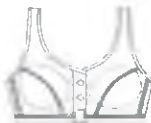
|                                                                                              |     |           |     |               |                    |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|---------------|--------------------|-------------|-------|
| <br>5301X   | 70  | A/B/C/D/E | 71  | At both sides | stitched           | Adjustable  | fixed |
|                                                                                              | 75  | A/B/C/D/E |     |               |                    |             |       |
|                                                                                              | 80  | A/B/C/D/E |     |               |                    |             |       |
|                                                                                              | 85  | A/B/C/D/E |     |               |                    |             |       |
|                                                                                              | 90  | A/B/C/D/E |     |               |                    |             |       |
|                                                                                              | 95  | A/B/C/D   |     |               |                    |             |       |
| <br>5315X   | 75  | A/B/C/D   | 100 | At both sides | stitched           | Unregulated | fixed |
|                                                                                              | 80  | A/B/C/D   |     |               |                    |             |       |
|                                                                                              | 85  | A/B/C/D   |     |               |                    |             |       |
|                                                                                              | 90  | A/B/C/D   |     |               |                    |             |       |
|                                                                                              | 95  | A/B/C/D   |     |               |                    |             |       |
|                                                                                              | 100 | A/B/C/D   |     |               |                    |             |       |
|                                                                                              | 105 | A/B/C     |     |               |                    |             |       |
|                                                                                              | 110 | A/B/C     |     |               |                    |             |       |
| <br>5322X | 70  | A/B/C/D   | 100 | At both sides | Seamless<br>molded | Adjustable  | fixed |
|                                                                                              | 75  | A/B/C/D   |     |               |                    |             |       |
|                                                                                              | 80  | A/B/C/D   |     |               |                    |             |       |
|                                                                                              | 85  | A/B/C/D   |     |               |                    |             |       |
|                                                                                              | 90  | A/B/C/D   |     |               |                    |             |       |
|                                                                                              | 95  | A/B/C/D   |     |               |                    |             |       |
|                                                                                              | 100 | A/B/C/D   |     |               |                    |             |       |
|                                                                                              | 105 | A/B/C     |     |               |                    |             |       |
|                                                                                              | 110 | A/B/C     |     |               |                    |             |       |
|                                                                                              | 115 | A/B/C     |     |               |                    |             |       |

|                                                                                                     |            |                       |           |               |                    |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|------------|-------|
| <br><b>5349X</b>   | <b>75</b>  | <b>A/B/C/D/E/F/G</b>  | <b>71</b> | At both sides | stitched           | Adjustable | fixed |
|                                                                                                     | <b>80</b>  | <b>A/B/C/D/E/F/G</b>  |           |               |                    |            |       |
|                                                                                                     | <b>85</b>  | <b>A/B/C/D/E/F/G</b>  |           |               |                    |            |       |
|                                                                                                     | <b>90</b>  | <b>A/B/C/D/E/F/G</b>  |           |               |                    |            |       |
|                                                                                                     | <b>95</b>  | <b>A/B/C/D/E/F/G</b>  |           |               |                    |            |       |
|                                                                                                     | <b>100</b> | <b>A/B/C/D/E/F/G</b>  |           |               |                    |            |       |
|                                                                                                     | <b>105</b> | <b>A/B/C/D</b>        |           |               |                    |            |       |
|                                                                                                     | <b>110</b> | <b>A/B/C/D</b>        |           |               |                    |            |       |
|                                                                                                     | <b>115</b> | <b>A/B/C/D</b>        |           |               |                    |            |       |
| <br><b>5398X</b>   | <b>60</b>  | <b>B</b>              | <b>74</b> | At both sides | stitched           | Adjustable | fixed |
|                                                                                                     | <b>65</b>  | <b>B</b>              |           |               |                    |            |       |
|                                                                                                     | <b>70</b>  | <b>A/B/C</b>          |           |               |                    |            |       |
|                                                                                                     | <b>75</b>  | <b>A/B/C</b>          |           |               |                    |            |       |
|                                                                                                     | <b>80</b>  | <b>A/B/C</b>          |           |               |                    |            |       |
|                                                                                                     | <b>85</b>  | <b>A/B/C</b>          |           |               |                    |            |       |
|                                                                                                     | <b>90</b>  | <b>A/B/C</b>          |           |               |                    |            |       |
|                                                                                                     | <b>95</b>  | <b>A/B/C</b>          |           |               |                    |            |       |
| <br><b>5706X</b> | <b>70</b>  | <b>AA/A/B/C/D/E/F</b> | <b>71</b> | At both sides | Seamless<br>molded | Adjustable | fixed |
|                                                                                                     | <b>75</b>  | <b>AA/A/B/C/D/E/F</b> |           |               |                    |            |       |
|                                                                                                     | <b>80</b>  | <b>AA/A/B/C/D/E/F</b> |           |               |                    |            |       |
|                                                                                                     | <b>85</b>  | <b>AA/A/B/C/D/E/F</b> |           |               |                    |            |       |
|                                                                                                     | <b>90</b>  | <b>AA/A/B/C/D/E</b>   |           |               |                    |            |       |
|                                                                                                     | <b>95</b>  | <b>AA/A/B/C/D</b>     |           |               |                    |            |       |
|                                                                                                     | <b>100</b> | <b>AA/A/B/C/D</b>     |           |               |                    |            |       |

|                                                                                              |     |            |    |               |                 |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|---------------|-----------------|------------|-------|
| <br>5712X   | 75  | A/B/C/D/E  | 71 | At both sides | stitched        | Adjustable | fixed |
|                                                                                              | 80  | A/B/C/D/E  |    |               |                 |            |       |
|                                                                                              | 85  | A/B/C/D/E  |    |               |                 |            |       |
|                                                                                              | 90  | A/B/C/D/E  |    |               |                 |            |       |
|                                                                                              | 95  | A/B/C/D/E  |    |               |                 |            |       |
|                                                                                              | 100 | A/B/C/D/E  |    |               |                 |            |       |
| <br>5722X   | 70  | A/B/C/D    | 71 | At both sides | Seamless molded | Adjustable | fixed |
|                                                                                              | 75  | A/B/C/D    |    |               |                 |            |       |
|                                                                                              | 80  | A/B/C/D    |    |               |                 |            |       |
|                                                                                              | 85  | A/B/C/D    |    |               |                 |            |       |
|                                                                                              | 90  | A/B/C/D    |    |               |                 |            |       |
|                                                                                              | 95  | A/B/C/D    |    |               |                 |            |       |
|                                                                                              | 100 | A/B/C/D    |    |               |                 |            |       |
|                                                                                              | 105 | A/B/C      |    |               |                 |            |       |
|                                                                                              | 110 | A/B/C      |    |               |                 |            |       |
| <br>5726X | 75  | AA/A/B/C/D | 65 | At both sides | Seamless molded | Adjustable | fixed |
|                                                                                              | 80  | AA/A/B/C/D |    |               |                 |            |       |
|                                                                                              | 85  | AA/A/B/C/D |    |               |                 |            |       |
|                                                                                              | 90  | AA/A/B/C/D |    |               |                 |            |       |
|                                                                                              | 95  | AA/A/B/C   |    |               |                 |            |       |
|                                                                                              | 100 | AA/A/B     |    |               |                 |            |       |
|                                                                                              | 105 | AA/A/B     |    |               |                 |            |       |
|                                                                                              | 110 | AA/A/B     |    |               |                 |            |       |

|                                                                                              |     |             |    |               |          |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----|---------------|----------|------------|-------|
| <br>5727X   | 75  | B/C/D/E     | 75 | At both sides | stitched | Adjustable | fixed |
|                                                                                              | 80  | B/C/D/E     |    |               |          |            |       |
|                                                                                              | 85  | B/C/D/E     |    |               |          |            |       |
|                                                                                              | 90  | B/C/D/E     |    |               |          |            |       |
|                                                                                              | 95  | B/C/D/E     |    |               |          |            |       |
| <br>5749X   | 75  | A/B/C/D/E/F | 74 | At both sides | stitched | Adjustable | fixed |
|                                                                                              | 80  | A/B/C/D/E/F |    |               |          |            |       |
|                                                                                              | 85  | A/B/C/D/E/F |    |               |          |            |       |
|                                                                                              | 90  | A/B/C/D/E/F |    |               |          |            |       |
|                                                                                              | 95  | A/B/C/D/E/F |    |               |          |            |       |
|                                                                                              | 100 | A/B/C/D/E/F |    |               |          |            |       |
|                                                                                              | 105 | A/B/C/D     |    |               |          |            |       |
|                                                                                              | 110 | A/B/C/D     |    |               |          |            |       |
|                                                                                              | 115 | A/B/C/D     |    |               |          |            |       |
| <br>5750X  | 75  | A/B/C/D/E   | 80 | At both sides | stitched | Adjustable | fixed |
|                                                                                              | 80  | A/B/C/D/E   |    |               |          |            |       |
|                                                                                              | 85  | A/B/C/D/E   |    |               |          |            |       |
|                                                                                              | 90  | A/B/C/D/E   |    |               |          |            |       |
|                                                                                              | 95  | A/B/C/D/E   |    |               |          |            |       |
|                                                                                              | 100 | A/B/C/D/E   |    |               |          |            |       |
|                                                                                              | 105 | A/B/C/D/E   |    |               |          |            |       |
| <br>5751X | 75  | AA/A/B/C/D  | 74 | At both sides | stitched | Adjustable | fixed |
|                                                                                              | 80  | AA/A/B/C/D  |    |               |          |            |       |
|                                                                                              | 85  | AA/A/B/C/D  |    |               |          |            |       |
|                                                                                              | 90  | AA/A/B/C/D  |    |               |          |            |       |
|                                                                                              | 95  | AA/A/B/C/D  |    |               |          |            |       |

|                                                                                            |     |             |    |               |                    |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----|---------------|--------------------|------------|-------|
| <br>5752X | 75  | A/B/C       | 74 | At both sides | Seamless<br>molded | Adjustable | fixed |
|                                                                                            | 80  | A/B/C       |    |               |                    |            |       |
|                                                                                            | 85  | A/B/C       |    |               |                    |            |       |
|                                                                                            | 90  | A/B/C       |    |               |                    |            |       |
| <br>5754X | 75  | A/B/C/D/E   | 71 | At both sides | stitched           | Adjustable | fixed |
|                                                                                            | 80  | A/B/C/D/E   |    |               |                    |            |       |
|                                                                                            | 85  | A/B/C/D/E   |    |               |                    |            |       |
|                                                                                            | 90  | A/B/C/D/E   |    |               |                    |            |       |
|                                                                                            | 95  | A/B/C/D     |    |               |                    |            |       |
| <br>5763X | 75  | A/B/C/D/E/F | 72 | At both sides | stitched           | Adjustable | fixed |
|                                                                                            | 80  | A/B/C/D/E/F |    |               |                    |            |       |
|                                                                                            | 85  | A/B/C/D/E/F |    |               |                    |            |       |
|                                                                                            | 90  | A/B/C/D/E/F |    |               |                    |            |       |
|                                                                                            | 95  | A/B/C/D/E/F |    |               |                    |            |       |
|                                                                                            | 100 | A/B/C/D/E/F |    |               |                    |            |       |
|                                                                                            | 105 | A/B/C/D     |    |               |                    |            |       |
|                                                                                            | 110 | A/B/C/D     |    |               |                    |            |       |
|                                                                                            | 115 | A/B/C/D     |    |               |                    |            |       |
| 5765X                                                                                      | XS  | A/B/C/D     | 75 | At both sides | Seamless<br>molded | Adjustable | fixed |
|                                                                                            | S   | A/B/C/D     |    |               |                    |            |       |
|                                                                                            | M   | A/B/C/D     |    |               |                    |            |       |
|                                                                                            | L   | A/B/C/D     |    |               |                    |            |       |
|                                                                                            | XL  | A/B/C/D     |    |               |                    |            |       |
|                                                                                            | XXL | A/B/C/D     |    |               |                    |            |       |



|                                                                                              |            |                   |     |               |                 |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----|---------------|-----------------|------------|-----------|
| <br>5768X   | <b>S</b>   | -                 | 100 | At both sides | Seamless molded | Adjustable | Removable |
|                                                                                              | <b>M</b>   | -                 |     |               |                 |            |           |
|                                                                                              | <b>L</b>   | -                 |     |               |                 |            |           |
|                                                                                              | <b>XL</b>  | -                 |     |               |                 |            |           |
| <br>5769X   | <b>S</b>   | -                 | 100 | At both sides | Seamless molded | Adjustable | Removable |
|                                                                                              | <b>M</b>   | -                 |     |               |                 |            |           |
|                                                                                              | <b>L</b>   | -                 |     |               |                 |            |           |
|                                                                                              | <b>XL</b>  | -                 |     |               |                 |            |           |
|                                                                                              | <b>XXL</b> | -                 |     |               |                 |            |           |
| <br>5776X   | <b>70</b>  | <b>AA/A/B/C/D</b> | 72  | At both sides | Seamless molded | Adjustable | fixed     |
|                                                                                              | <b>75</b>  | <b>AA/A/B/C/D</b> |     |               |                 |            |           |
|                                                                                              | <b>80</b>  | <b>AA/A/B/C/D</b> |     |               |                 |            |           |
|                                                                                              | <b>85</b>  | <b>AA/A/B/C/D</b> |     |               |                 |            |           |
|                                                                                              | <b>90</b>  | <b>AA/A/B/C/D</b> |     |               |                 |            |           |
|                                                                                              | <b>95</b>  | <b>AA/A/B/C/D</b> |     |               |                 |            |           |
| <br>5782X  | <b>75</b>  | <b>A/B/C/D/E</b>  | 75  | At both sides | stitched        | Adjustable | fixed     |
|                                                                                              | <b>80</b>  | <b>A/B/C/D/E</b>  |     |               |                 |            |           |
|                                                                                              | <b>85</b>  | <b>A/B/C/D/E</b>  |     |               |                 |            |           |
|                                                                                              | <b>90</b>  | <b>A/B/C/D/E</b>  |     |               |                 |            |           |
|                                                                                              | <b>95</b>  | <b>A/B/C/D/E</b>  |     |               |                 |            |           |
| <br>5792X | <b>70</b>  | <b>B/C/D</b>      | 80  | At both sides | stitched        | Adjustable | fixed     |
|                                                                                              | <b>75</b>  | <b>B/C/D</b>      |     |               |                 |            |           |
|                                                                                              | <b>80</b>  | <b>B/C/D</b>      |     |               |                 |            |           |
|                                                                                              | <b>85</b>  | <b>B/C/D</b>      |     |               |                 |            |           |
|                                                                                              | <b>90</b>  | <b>B/C/D</b>      |     |               |                 |            |           |
|                                                                                              | <b>95</b>  | <b>B/C/D</b>      |     |               |                 |            |           |

Note – Tolerances for all characteristics are  $\pm 15\%$ .

Compression class - 0.

| Model | Surface-density<br>g/cu.m. | Permissible<br>shrinkage after<br>streak % | Elongation<br>before<br>washing % | Stretch-<br>awn after<br>washing % | Tensile set<br>before<br>washing % | Tensile set<br>after<br>washing % |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1199  | 105 -115                   | no more than 3                             | 11-21                             | 15-25                              | max. 3                             | max. 4                            |
| 4705X | 66-74                      | no more than 4                             | 14-20                             | 17-23                              | max. 3                             | max. 5                            |
| 4706X | 147-157                    | no more than 5                             | 111-150                           | 120-159                            | max. 8                             | max. 10                           |
| 4723X | 133-147                    | no more than 6                             | 10-30                             | 12-32                              | max. 3                             | max. 4                            |
| 4769X | 147-163                    | no more than 7                             | 25-35                             | 27-37                              | max. 3                             | max. 4                            |
| 4787X | 85 - 93                    | no more than 3                             | 77-104                            | 79-106                             | max. 5                             | max. 7                            |
| 5300X | 175-205                    | no more than 5                             | 135-165                           | 140-170                            | max. 10                            | max. 11                           |
| 5301X | 143-157                    | no more than 8                             | 10-30                             | 12-23                              | max. 3                             | max. 5                            |
| 5315X | 187-103                    | no more than 5                             | 10-30                             | 12-23                              | max. 5                             | max. 7                            |
| 5322X | 200- 240                   | no more than 7                             | 80-110                            | 82-112                             | max. 3                             | max. 4                            |
| 5349X | 201-258                    | no more than 5                             | 90-110                            | 95-115                             | max. 5                             | max. 7                            |
| 5398X | 81-89                      | no more than 5                             | 10-20                             | 13-23                              | max. 3                             | max. 6                            |
| 5706X | 68-78                      | no more than 5                             | 210-250                           | 230-270                            | max. 18                            | max. 25                           |
| 5712X | 147-163                    | no more than 7                             | 25-35                             | 27-37                              | max. 3                             | max. 4                            |
| 5722X | 200- 240                   | no more than 7                             | 80-110                            | 82-112                             | max. 3                             | max. 5                            |
| 5726X | 201-258                    | no more than 3                             | 190-210                           | 195-215                            | max. 6                             | max. 8                            |
| 5727X | 105 -115                   | no more than 3                             | 11-21                             | 15-25                              | max. 3                             | max. 4                            |
| 5749X | 187-103                    | no more than 5                             | 10-30                             | 12-32                              | max. 5                             | max. 7                            |
| 5750X | 68-78                      | no more than 5                             | 210-250                           | 230-270                            | max. 18                            | max. 25                           |
| 5751X | 187-103                    | no more than 5                             | 10-30                             | 12-32                              | max. 5                             | max. 7                            |
| 5752X | 68-78                      | no more than 5                             | 210-250                           | 230-270                            | max. 18                            | max. 25                           |
| 5754X | 147-163                    | no more than 7                             | 25-35                             | 27-37                              | max. 3                             | max. 4                            |
| 5763X | 147-163                    | no more than 7                             | 25-35                             | 27-37                              | max. 3                             | max. 4                            |
| 5765X | 247-273                    | no more than 5                             | 30-50                             | 35-55                              | max. 4                             | max. 6                            |
| 5768X | 250-270                    | no more than 5                             | 200-240                           | 230-270                            | max. 20                            | max. 13                           |
| 5769X | 250-270                    | no more than 5                             | 200-240                           | 230-270                            | max. 20                            | max. 13                           |
| 5776X | 147-157                    | no more than 5                             | 111-150                           | 120-159                            | max. 8                             | max. 10                           |
| 5782X | 147-163                    | no more than 7                             | 130-150                           | 135-155                            | max. 3                             | max. 4                            |
| 5792X | 103-187                    | no more than 5                             | 10-30                             | 12-23                              | max. 5                             | max. 7                            |
| 5798X | 86-95                      | no more than 5                             | 170-230                           | 180- 240                           | max. 15                            | max. 20                           |

## 5 MATERIALS USED IN MANUFACTURING

Bras are made from the materials shown in Table 2.

Table 2

| No. | Bra model name | Material                                                                                                                                                      |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1199           | 55% polyester brand OEKO -TEX®,<br>35% polyamide OEKO - TEX®,<br>10% elastane OEKO -TEX®                                                                      |
| 2   | 4705X          | 31% polyester OEKO -TEX®,<br>30% polyamide OEKO - TEX®,<br>22% cotton OEKO -TEX®,<br>9% polyurethane OEKO -TEX®,<br>8% elastane OEKO -TEX®                    |
| 3   | 4706X          | 47% polyester OEKO -TEX®,<br>39% polyamide OEKO - TEX®,<br>14% elastane OEKO -TEX®<br>molded cup:<br>52% polyurethane OEKO -TEX®,<br>48% polyester OEKO -TEX® |
| 4   | 4723X          | 38% polyester OEKO -TEX®,<br>37% polyamide OEKO - TEX®,<br>16% cotton,<br>9% elastane OEKO -TEX®                                                              |
| 5   | 4787X          | 80% polyamide OEKO - TEX®,<br>20% elastane OEKO -TEX®                                                                                                         |
| 6   | 5300X          | 80% polyamide OEKO - TEX®,<br>20% elastane OEKO -TEX®                                                                                                         |
| 7   | 5301X          | 97% cotton OEKO -TEX®,<br>2% polyamide OEKO - TEX®,<br>1% elastane OEKO -TEX®                                                                                 |
| 8   | 5315X          | 90% cotton OEKO -TEX®,<br>10% elastane OEKO -TEX®                                                                                                             |
| 9   | 5322X          | 45% polyester OEKO -TEX®,<br>45% viscose fabric brand MICROMODAL,<br>10% elastane OEKO -TEX®                                                                  |
| 10  | 5349X          | 50% polyamide OEKO - TEX®,<br>30% polyester OEKO -TEX®,<br>10% elastane OEKO -TEX®,<br>5% cotton OEKO -TEX®,                                                  |

|    |       |                                                                                                                                                                      |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | 5% viscose OEKO -TEX ®                                                                                                                                               |
| 11 | 5398X | 60% polyester OEKO -TEX®,<br>20% polyamide OEKO - TEX®,<br>15% cotton OEKO -TEX®,<br>5% elastane OEKO -TEX ®                                                         |
| 12 | 5706X | 65% polyester OEKO -TEX®,<br>25% polyamide OEKO - TEX®,<br>10% elastane OEKO -TEX ®<br><br>Molded bowl:<br>52% polyurethane OEKO -TEX ®,<br>48% polyester OEKO -TEX® |
| 13 | 5712X | 75% polyamide OEKO - TEX®,<br>20% cotton OEKO -TEX®,<br>5% elastane OEKO -TEX ®                                                                                      |
| 14 | 5722X | 45% polyester OEKO -TEX®,<br>45% viscose fabric brand MICROMODAL,<br>10% elastane OEKO -TEX ®                                                                        |
| 15 | 5726X | 75% polyamide OEKO - TEX®,<br>25% elastane OEKO -TEX ®                                                                                                               |
| 16 | 5727X | 74% polyester OEKO -TEX®,<br>22% polyamide OEKO - TEX®,<br>4% elastane OEKO -TEX ®                                                                                   |
| 17 | 5749X | 50% polyamide OEKO - TEX®,<br>30% polyester OEKO -TEX®,<br>10% elastane OEKO -TEX®,<br>5% cotton OEKO -TEX®,<br>5% viscose OEKO -TEX ®                               |
| 18 | 5750X | 46% polyamide OEKO - TEX®,<br>40% polyester OEKO -TEX®,<br>14% elastane OEKO -TEX ®                                                                                  |
| 19 | 5751X | 36% polyester OEKO -TEX®,<br>31% polyamide OEKO - TEX®,<br>25% cotton OEKO -TEX®,<br>8% elastane OEKO -TEX ®                                                         |
| 20 | 5752X | 58% polyester OEKO -TEX®,<br>27% polyamide OEKO - TEX®,                                                                                                              |

|    |       |                                                                                                              |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | 15% elastane OEKO -TEX ®                                                                                     |
| 21 | 5754X | 65% polyamide OEKO - TEX®,<br>30% cotton OEKO -TEX®,<br>5% elastane OEKO -TEX ®                              |
| 22 | 5763X | 72% polyamide OEKO - TEX®,<br>16% cotton OEKO -TEX®,<br>12% elastane OEKO -TEX ®                             |
| 23 | 5765X | 85% cotton OEKO -TEX®,<br>8% elastane OEKO -TEX ®,<br>7% polyamide OEKO - TEX®                               |
| 24 | 5768X | 88% polyamide OEKO - TEX®,<br>12% elastane OEKO -TEX ®                                                       |
| 25 | 5769X | 97% polyamide OEKO - TEX®,<br>3% elastane OEKO -TEX ®                                                        |
| 26 | 5776X | 79% polyamide OEKO - TEX®,<br>21% elastane OEKO -TEX ®                                                       |
|    |       | molded cup:<br>52% polyurethane OEKO -TEX ®,<br>48% polyester OEKO -TEX®                                     |
| 27 | 5782X | 72% polyamide OEKO - TEX®,<br>23% cotton OEKO -TEX®,<br>5% elastane OEKO -TEX ®                              |
| 28 | 5792X | 50% polyester OEKO -TEX®,<br>27% cotton OEKO -TEX®,<br>21% polyamide OEKO - TEX®,<br>2% elastane OEKO -TEX ® |

Hooks, eyelets and zip fasteners use 420 SS stainless steel .

For the buttons of the fasteners, ABS plastic PA 200 is used.

In the manufacture of bras, dyes are used: lilac, white, black, gray, lilac, mother-of-pearl, pink, red, all dyes of the OEKO -TEKS ® trademark.

All color options are provided by mixing basic dyes.

---

## 6 USING A BRA

6.1 Open the packaging and check the bra for any mechanical damage.

If any problems are found, contact the manufacturer's authorized representative immediately.

---

### **Warning**

---

• **Disposal of packaging materials must be carried out in accordance with your local regulations.**

---

6.2 The product is intended for use by women who have undergone breast surgery.

6.3 The product provides immobilization of the mammary gland and stabilization of the shape of the breast, which contributes to accelerated healing and normalization of lymphatic drainage.

Some models of bras are equipped with insert pockets. Insert pockets are not intended for fixation and fastening of exoprotheses and are used for inserts imitating the shape of the breast.

6.4 How to use:

- Before use, check the product for dirt and tears.
- When using the product, place the insert in the dedicated pocket.
- Put on the product, fix it on the body with a fastener.
- Make sure that the product is not too tight and that there are no discomfort.

## **7 CARE AND CLEANING**

If the product is dirty, it is necessary to wash it in the manner and in the mode indicated by the care symbols (see clause 8.2). It is forbidden to use bleaches and to apply cleaning with chemical preparations.

It is forbidden to use the spin cycle when washing the product in the washing machine.

After washing, dry the product on a flat surface.

## 8 MARKING

### 8.1 Marking applied to the tag sewn to the bra:

- bra model;
- name and (or) logo of the manufacturer;
- place of production;
- serial number;
- fabric structure;
- the size;
- care symbols (see clause 6.1.2);
- manufacturer's address;
- CE marking;
- Barcode.

### 8.2 Care symbols to be applied to the label sewn to the bra:

| Bra model name | Wash | Whitening | Drying | Ironing and pressing | professional care |
|----------------|------|-----------|--------|----------------------|-------------------|
| 1199           |      |           |        |                      |                   |
| 4705X          |      |           |        |                      |                   |
| 4706X          |      |           |        |                      |                   |
| 4723X          |      |           |        |                      |                   |
| 4787X          |      |           |        |                      |                   |
| 5300X          |      |           |        |                      |                   |
| 5301X          |      |           |        |                      |                   |
| 5315X          |      |           |        |                      |                   |
| 5322X          |      |           |        |                      |                   |



|       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5349X |    |    |    |    |    |
| 5398X |    |    |    |    |    |
| 5706X |    |    |    |    |    |
| 5712X |    |    |    |    |    |
| 5722X |    |    |    |    |    |
| 5726X |    |    |    |    |    |
| 5727X |    |    |    |    |    |
| 5749X |   |   |   |   |   |
| 5750X |  |  |  |  |  |
| 5751X |  |  |  |  |  |
| 5752X |  |  |  |  |  |
| 5754X |  |  |  |  |  |
| 5763X |  |  |  |  |  |
| 5765X |  |  |  |  |  |
| 5768X |  |  |  |  |  |
| 5769X |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5776X |  |  |  |  |  |
| 5782X |  |  |  |  |  |
| 5792X |  |  |  |  |  |

### 8.3 Marking applied to the bra packaging:

- product name;
- bra model;
- manufacturer's logo;
- serial number;
- date of manufacture;
- fabric structure;
- the size;
- name and address of the manufacturer;
- **Place of manufacture;**
- CE marking
- Barcode;
- QR code;
- Disposal instructions;
- Information about the authorized representative;
- Number and date of registration certificate;
- **Instructions on how to wash the product;**
- **Notification of the use of bleaching agents;**
- **Instructions for drying the product;**
- **Note on the prohibition of ironing the product;**
- **Instructions for professional dry cleaning;**
- **"Keep dry" symbol.**

#### 8.4 Decoding of all marking symbols:

| Символ                                                                              | Значение                                                 | Описание                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | Серийный номер                                           | Серийный номер изделия                                |
|    | Производитель                                            | Наименование производителя изделия                    |
|    | Дата производства                                        | Дата производства изделия                             |
|    | Ручная стирка, максимальная температура 40°C             | Указание на способ стирки изделия                     |
|    | Максимальная температура стирки 30°C<br>Обычный режим    | Указание на способ стирки изделия                     |
|   | Максимальная температура стирки 30°C<br>Деликатный режим | Указание на способ стирки изделия                     |
|  | Максимальная температура стирки 40°C<br>Деликатный режим | Указание на способ стирки изделия                     |
|  | Отбеливание запрещено                                    | Указание на запрет использования отбеливающих средств |
|  | Барабанная сушка запрещена                               | Указание на способ сушки изделия                      |
|  | Глажение запрещено                                       | Указание на запрет глажения изделия                   |
|  | Профессиональная сухая чистка запрещена                  | Указание по профессиональной сухой чистке             |
|  | СЕ маркировка                                            | СЕ маркировка                                         |
|  | Беречь от влаги                                          | Указание на запрет воздействия влаги                  |

---

## 9 PACKAGING

The bra is packed in a box with instructions for use.

The box must be pasted over with a polyethylene tape with an adhesive layer or sealed so that the package cannot be opened without breaking the integrity.

## **10 SAFETY REQUIREMENTS AND ENVIRONMENTAL PROTECTION**

### **10.1 Safety requirements**

Serviceability in accordance with IEC 62366.

Bra materials must be biologically safe and meet the requirements of the ISO 10993 group of standards.

### **10.2 Environmental protection**

The materials used in the manufacture of a bra must not pose a danger to human life, health and the environment both during operation and after its expiration.

The main type of possible hazardous impact on the environment is pollution of the atmospheric air of populated areas, soils and waters as a result of:

- emergency leaks (placers) of production materials;
- unorganized waste disposal on the territory of the manufacturer or outside it;
- random dumping of waste in places not intended for this purpose.

## 11 TRANSPORT AND STORAGE

### 11.1 Transport conditions

The bra can be transported by all types of covered vehicles and the rules for the carriage of goods in force for each type of transport.

The transportation of the bra by sea must be carried out in accordance with the "Safety Rules for the Sea Transportation of General Cargoes". Type of shipment - containers and small shipment.

The bra, during transportation, must be resistant to climatic influences, at temperatures from  $-40^{\circ}\text{C}$  to  $+50^{\circ}\text{C}$ , relative humidity up to 90% and atmospheric pressure from 70 to 106 kPa.

The bra, during transportation, must be resistant to mechanical stress, with the following parameters:

- vibration loads - frequency range 10-55 Hz with a displacement amplitude of 0.15 mm;
- shock loads - peak shock acceleration 100 ms<sup>-2</sup> with a duration of 16 ms.

### 11.2 Storage conditions

The bra, during storage, must be resistant to climatic influences, at temperatures from  $-40^{\circ}\text{C}$  to  $+50^{\circ}\text{C}$ , relative humidity up to 90% and atmospheric pressure from 70 to 106 kPa.

Storage conditions:

- Keep away from water .

---

## 12 MAINTENANCE AND REPAIR

The bra is not subject to maintenance, except for washing, and is not subject to repair.

### 13 DISPOSAL INFORMATION

Disposal of the bra must be carried out in accordance with the disposal rules in force on the territory of the Russian Federation, according to waste class A, belongs to class A - epidemiological safe waste.

The bra must be disposed of if:

- end of service life;
- confirmation of facts and circumstances that pose a threat to the life and health of the user and indicate failure to fulfill the intended purpose.

Recycling is also subject to all packaging, including transport. Paper, wood, polyethylene and plastic must be disposed of separately in accordance with the rules for the collection, accounting and disposal of packaging.



## 14 MANUFACTURER WARRANTY

### **Service life - 10 years.**

The bra is guaranteed for a period of 12 months from the date of sale from the manufacturer's warehouse.

It is guaranteed that the bra is free from defects related to the production and quality of production materials.

The manufacturer or an authorized representative of the manufacturer in the territory of the Russian Federation shall not be liable for any personal / material damage caused by erroneous use, operation for purposes other than the intended purpose, and negligent cleaning.

Authorized representative of the manufacturer in the territory of the Russian Federation: Limited Liability Company "MEDPARTNER" (LLC "MEDPARTNER") at the address 194100, St. Petersburg, Bolshoy Sampsonievsky Prospekt, 68, letter N, office 268; phone +7 812 200 94 15; email hi @ medpartner . pro .

### WARRANTY CARD

Product category \_\_\_\_\_  
 Manufacturer \_\_\_\_\_  
 Version \_\_\_\_\_ Stamp \_\_\_\_\_  
 Serial number/art. \_\_\_\_\_ about sale  
 Date of sale \_\_\_\_\_  
 Organization of the seller \_\_\_\_\_  
 Seller's signature \_\_\_\_\_  
 The product has been tested and has no damage.  
 I have read and agree to the terms of use.  
 Buyer's signature \_\_\_\_\_

The warranty period is 12 months from the date of sale from the manufacturer's warehouse.

For warranty issues, please contact: Limited Liability Company "MEDPARTNER" (LLC "MEDPARTNER") at 194100, St. Petersburg, Bolshoi Sampsonievsky Prospekt, 68, letter H, office 268; phone +7 812 200 94 15; email hi @ medpartner . pro .

*ATTENTION! Make sure that the warranty card is filled out correctly. The serial number of the product / article must exactly match the number in the coupon. All columns of the coupon (with the exception of the columns for the guarantee center) must be filled in.*

*In case of inaccurate or incomplete filling of the coupon, the warranty for the product is considered lost.*

*The manufacturer's warranty is carried out in accordance with the Civil Code of the Russian Federation on a general basis.*

*The product must not bear traces of mechanical or thermal effects, as well as traces of exposure to various chemical agents. The product may only be operated in accordance with the instruction manual for the product.*

### WARRANTY STATEMENT

| THE DATE | DESCRIPTION | WARRANTY CENTER |
|----------|-------------|-----------------|
|          |             |                 |

---

## 15 COMPLAINT DETAILS

In case of complaints about the product, contact: Limited Liability Company "MEDPARTNER" (LLC "MEDPARTNER") at 194100, St. Petersburg, Bolshoy Sampsonievsky Prospekt, 68, letter N, office 268; phone +7 812 200 94 15; email hi @ medpartner . pro .

The list of regulatory documentation used by the manufacturer to confirm compliance:

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EN 1041</b> , Information provided by the manufacturer of medical devices                                                                               |
| <b>ISO 13485</b> , Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes                                                     |
| <b>ISO 14971</b> , Medical devices - Application of risk management to medical devices                                                                     |
| <b>ISO 15223-1</b> , Medical devices - Symbols to be used on medical device labels, markings and information to be provided - Part 1: General requirements |
| <b>IEC 62366</b> , Medical devices - Serviceability applications                                                                                           |
| <b>ISO 10993-1</b> , Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing as part of the risk management process                      |
| <b>ISO 10993-5</b> , Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for cytotoxicity by the in method vitro                                      |
| <b>ISO 10993-10</b> , Biological evaluation of medical devices - Part 10: Skin irritation and sensitization tests                                          |
| <b>EN 980</b> - Symbols used on the labeling of medical devices                                                                                            |

e.Nr. 0133 / 2023

City: Rosenheim  
Country: Germany/Bavaria

I hereby certify that the document affixed and sealed hereto was signed in my presence by

Mr. Johannes Weber-Unger,  
date of birth: 16. August 1982,  
place of residence: Pienzenauerstr. 15, 6330 Kufstein, Austria,  
personally known to me, Notary out of service,


acting on behalf of

**ANITA Dr. Helbig GmbH**  
**with registered office at Grafenstr. 23, 83098 Brannenburg, Germany.**

as this company's managing director (Geschäftsführer).

Upon my inspection of the Commercial Register on today, I further certify that ANITA Dr. Helbig GmbH is registered with the Municipal Court of Traunstein - Commercial Register - under No. HRB 746 and that Mr. Johannes Weber-Unger is entitled to act individually as this company's legal representative.

Rosenheim, this 26<sup>th</sup> day of January 2023

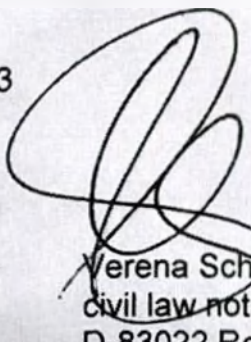

Verena Schittenbauer,  
civil law notary,  
D-83022 Rosenheim,  
Kufsteiner Str. 14

Перевод с английского и немецкого языков на русский язык

(эмблема компании)  
Компания «Анита» (Anita)  
с 1886 г.

Анита Др. Хельбиг ГмбХ  
(Anita Dr. Helbig GmbH)  
Графенштрассе (Grafenstrasse) 23  
83098 Бранненбург (Brannenburg)

Йоханнес Вебер-Унгер (Johannes Weber Unger)  
Член правления

19.12.2022 г.

/Подпись/

**Инструкция по эксплуатации**  
**Версия 1.1. Дата изменений 19.12.2022**  
**Бюстгальтер медицинский послеоперационный,**  
**моделей 1199, 4705X, 4706X, 4723X, 4787X, 5300X, 5301X, 5315X, 5322X, 5349X, 5398X,**  
**5706X, 5712X, 5722X, 5726X, 5727X, 5749X, 5750X, 5751X, 5752X, 5754X, 5763X, 5765X,**  
**5768X, 5769X, 5776X, 5782X, 5792X**

Производство: Анита Др. Хельбиг ГмбХ (Anita Dr. Helbig GmbH)  
Графенштрассе (Grafenstrasse) 23, 832098, Бранненбург (Brannenburg), Германия (Germany)

/Подпись/

2022 г.

**Инструкция по эксплуатации**  
**Версия 1.1. Дата изменений 19.12.2022**

**ТЕКУЩАЯ ВЕРСИЯ.**

**Бюстгальтер медицинский послеоперационный,**  
**моделей 1199, 4705X, 4706X, 4723X, 4787X, 5300X, 5301X, 5315X,**  
**5322X, 5349X, 5398X, 5706X, 5712X, 5722X, 5726X, 5727X, 5749X, 5750X,**  
**5751X, 5752X, 5754X, 5763X, 5765X, 5768X, 5769X, 5776X, 5782X, 5792X**  
(далее по тексту – бюстгальтер(ы), изделие(я))

**Прежде чем использовать это изделие, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования!**

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

### **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ:**

- Не используйте изделие в случае его повреждения.
- Для правильного подбора изделия необходимо обратиться к специалисту.



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение                                                                                             | 5  |
| 1 Наименование, назначение и противопоказания                                                        | 6  |
| 2 Общее описание бюстгалтера                                                                         | 7  |
| 3 Конструктивные особенности и внешний вид бюстгалтера                                               | 8  |
| 4 Технические характеристики                                                                         | 25 |
| 5 Материалы, используемые при изготовлении                                                           | 35 |
| 6 Использование бюстгалтера                                                                          | 38 |
| 7 Правила ухода и чистки                                                                             | 39 |
| 8 Маркировка                                                                                         | 40 |
| 9 Упаковка                                                                                           | 44 |
| 10 Требования безопасности и охрана окружающей среды                                                 | 45 |
| 11 Транспортирование и хранение                                                                      | 46 |
| 12 Техническое обслуживание и ремонт                                                                 | 47 |
| 13 Сведения об утилизации                                                                            | 48 |
| 14 Гарантии изготовителя                                                                             | 49 |
| 15 Сведения о рекламациях                                                                            | 51 |
| Перечень нормативной документации, которая применяется производителем для подтверждения соответствия | 52 |

## ВВЕДЕНИЕ

Основной целью инструкции по эксплуатации является предоставление пользователю инструкции по использованию бюстгальтера, а также информации, касающейся его чистки. В руководстве приводятся эксплуатационные показатели бюстгальтера, его чистка, а также информация по безопасности. Перед началом использования пользователь должен внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации, чтобы правильно и безошибочно использовать бюстгальтер, с достижением указанных стандартов безопасности и эксплуатационных показателей.

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, моделей 1199, 4705X, 4706X, 4723X, 4787X, 5300X, 5301X, 5315X, 5322X, 5349X, 5398X, 5706X, 5712X, 5722X, 5726X, 5727X, 5749X, 5750X, 5751X, 5752X, 5754X, 5763X, 5765X, 5768X, 5769X, 5776X, 5782X, 5792X предназначен для ношения и поддержания и/или придания формы **груди** после хирургических вмешательств.

**Область применения:** в больницах и клиниках, а также в домашних (бытовых) условиях.

**Предполагаемый пользователь:** пациенты после мастэктомии, маммопластики, мастопексии, липофилинга груди, пластических операциях, удаления и замены имплантатов груди.

**Показания к применению:**

- после мастэктомии;
- после маммопластики;
- после мастопексии;
- после липофилинга груди;
- уход и восстановление после пластических операций;
- после удаления и замены имплантатов груди.

**Противопоказания к применению:**

- индивидуальная непереносимость материалов, используемых при изготовлении бюстгальтеров.

**Возможные осложнения:**

- натирание кожи.

**Возможные побочные действия:**

- аллергическая реакция на материалы, используемые при изготовлении бюстгальтеров.

**ВНИМАНИЕ!!! Бюстгальтеры не предназначены для фиксации и крепления экзопротезов!!!!**

**Оценка рисков:** Изделие спроектировано и изготовлено таким образом, что при использовании в условиях и в целях, соответствующих назначению, пользователем определенном в качестве предназначенного пользователя, в строгом соответствии с указанными показаниями, противопоказаниями, побочными действиями, действует согласно назначению и безопасно для пользователя и третьих лиц (Файл управления рисками F MDR-A-II-5 от 25.05.2021г).

Любой риск, связанный с их применением, является приемлемым при сопоставлении с пользой для пользователя (Файл управления рисками F MDR-A-II-5 от 25.05.2021г).

## 2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ БЮСТГАЛЬТЕРА

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и застежки.

В зависимости от модели застежка оснащается крючками с проушинами, пуговицами, кнопкой/липучкой или молнией.

Чаши могут быть бесшовными формованными или сшитыми.

Застежка может быть спереди или сзади бюстгальтера.

### **3 КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ВНЕШНИЙ ВИД БЮСТГАЛЬТЕРА**

#### **КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ВНЕШНИЙ ВИД БЮСТГАЛЬТЕРА**

##### **3.1 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 1199**



*Рисунок 1. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 1199*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и передней застежки. Бюстгальтер поддерживает и улучшает процесс заживления, уменьшает гематомы, отек или кровотечение.

Изготовлен из воздухопроницаемого материала и благодаря своей сетчатой структуре обеспечивает воздухопроницаемость. Чаши двухслойные, поэтому в области рубца не возникает отпечатков давления. Внутренняя часть из микрофибры впитывает влагу и отводит ее наружу. Внешняя структура сетки позволяет влаге быстро испаряться. Бретели плавно регулируются. Кроме того, передняя застежка снабжена двумя рядами крючков и проушин для большей гибкости по окружности. Задняя часть выполнена из эластичной воздушной сетки с особенно мощной лайкрой.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

Чаши формованные.

##### **3.2 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 4705X**



*Рисунок 2. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 4705X*

Бюстгальтер с цветочным кружевом и вырезами в чаше. Состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Наружная часть чашей из эластичного кружева, обтянутая тонким тюлем, с вырезами. Внутренняя часть чашей из мягкой, но прочной пены.

Декольте с мягкой эластичной лентой.

Бюстгальтер имеет карманы для вставок с обеих сторон.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

### 3.3 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 4706X



*Рисунок 3. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 4706X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Карманы для вставок с обеих сторон.

Бретели эластичные и регулируемые спереди.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

### 3.4 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 4723X



*Рисунок 4. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 4723X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Чаши разделены на четыре части с поперечным швом.

Нижняя часть чашей, боковые части бюстгальтера из блокировочных материалов, обшитые маркизетом больших размеров.

Верхний часть чашей из эластичной вышивки из тюля.

Карманы для вставок с обеих сторон.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

### 3.5 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 4787X



*Рисунок 5. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 4787X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

### 3.6 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5300X



*Рисунок 6. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5300X*

Карманы для вставок с обеих сторон.

Бюстгальтер из дышащего микрофибры – быстросохнущий.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Бретели дополнительно усилены в области плеч.

### 3.7 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5301X



*Рисунок 7. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5301X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

Карманы для вставок с обеих сторон.

### 3.8 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5315X



*Рисунок 8. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5315X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и передней застежки. Передняя застежка снабжена двумя пуговицами и плоской кнопкой/липучкой.

Карманы для вставок с обеих сторон.

Приятный для кожи эластичный хлопок.

Мягкие ленты на вырезе руки, груди и декольте

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.



### 3.9 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5322X



*Рисунок 9. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5322X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и передней застежки. Передняя застежка снабжена одним рядом крючков и проушин.


Карманы для вставок с обеих сторон

Конструкция бюстгальтера включает широкий эластичный пояс из махровой ткани.

Особенно мягкий подтек из махровой ткани на крючковой ленте передней застежки.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

### 3.10 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5349X

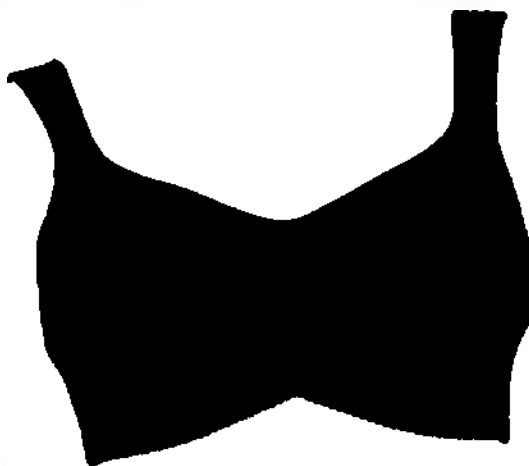

*Рисунок 10. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5349X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Карманы для вставок с обеих сторон из приятного хлопчатобумажного материала.

Широкие удобные бретели.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

### 3.11 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5398X



*Рисунок 11. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5398X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Карманы для вставок с обеих сторон.

Бретели эластичные и регулируемые спереди.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

### 3.12 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5706X



*Рисунок 12. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5706X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Карманы для вставок с обеих сторон из нежного дышащего тюля.

Бретели постоянно мягкие и служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

Задняя часть бюстгальтера усилена.

### 3.13 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5712X



*Рисунок 13. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5712X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Карманы для вставок с обеих сторон.

Встроенная поддержка груди при больших размерах.

Подложка из мягкой пены с оболочкой из микрофибры.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

### 3.14 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5722X



*Рисунок 14. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5722X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Карманы для вставок с обеих сторон.

Конструкция бюстгальтера включает широкий эластичный пояс из махровой ткани.

Бретели мягкие, покрытые махровой тканью и служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

### 3.15 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5726X



*Рисунок 15. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5726X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Карманы для вставок с обеих сторон.

Бесшовные предварительно сформированные чаши из мягкой микрофибры.

Боковая задняя часть бюстгальтера двухслойная без бокового шва.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

### 3.16 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5727X



*Рисунок 16. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5727X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Карманы для вставок с обеих сторон.

Наружная часть чашей из трех частей из эластичных материалов.

Задняя часть бюстгальтера выполнена с функциональным вырезом из сетчатого материала, позволяющего пропускать воздух.

Мягкие и эргономичные бретели обеспечивают высокий комфорт при ношении и предотвращают соскальзывание с плеча.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

### 3.17 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5749X



*Рисунок 17. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5749X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Карманы для вставок с обеих сторон из приятного хлопчатобумажного материала.

Узкие индивидуально регулируемые бретели.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

### 3.18 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5750X



*Рисунок 18. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5750X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Карманы для вставок с обеих сторон из мягкого эластичного тюля.

Чаши из трех частей, изготовленные из прочного, воздухопроницаемого жаккарда.

Комфортные бретели, украшенные узкими ленточками.

Задняя часть бюстгальтера из прочного, воздухопроницаемого материала.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

### 3.19 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5751X



*Рисунок 19. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5751X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Сшитые чаши из трех частей.

Оптически отделенная диафрагма, которая визуальнo уменьшает декольте.

Карманы для вставок с обеих сторон.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

### 3.20 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5752X



*Рисунок 20. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5752X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Бесшовные предварительно сформированные мягкие чаши.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.



### 3.21 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5754X



*Рисунок 21. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5754X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

### 3.22 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5763X



*Рисунок 22. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5763X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Эластичный материал в сочетании с тонким функциональным.

Карманы для вставок из мягкого хлопка, приятного для кожи, в нижней части чашей и тюля в верхней части чашей.

Полупрозрачная накладка.

Бретели в области плеч дополнительно оснащены приятной накладкой.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

### 3.23 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5765X



*Рисунок 23. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5765X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и передней застежки. Передняя застежка оснащена молнией и крючком для легкого закрытия молнии.

Конструкция бюстгальтера включает съёмные пенопластовые чаши, которые являются прочными и предварительно формованными.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

### 3.24 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5768X



*Рисунок 24. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5768X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и передней застежки. Передняя застежка оснащена молнией и крючком для легкого закрытия молнии.

Конструкция бюстгальтера включает съёмные пенопластовые чаши, которые являются прочными и предварительно формованными.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.



### 3.25 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5769X



*Рисунок 25. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5769X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Конструкция бюстгальтера включает съёмные пенопластовые чаши, которые являются прочными и предварительно формованными.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

### 3.26 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5776X



*Рисунок 26. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5776X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Наружная поверхность чашей покрыта цветочным кружевом.

Декоративная лента на декольте.

Карманы для вставок с обеих сторон.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

### 3.27 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5782X



*Рисунок 27. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5782X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Эластичное кружево в верхней части чашей, с эластичной лентой для декольте.

Карманы для вставок с обеих сторон.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

### 3.28 Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5792X



*Рисунок 28. Внешний вид бюстгальтера медицинского послеоперационного модели 5792X*

Бюстгальтер состоит из бретелей, чашей и задней застежки.

Карманы для вставок из хлопка, приятного для кожи.

Легкий эластичный бретели.

Бретели служат для удержания изделия на плечах. Застежка служит для фиксации изделия на теле.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 1199 в составе:

- 1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 1199, размер: 70/75/80/85/90/95/100/105 – A/B/C/D/E или 110/115 – A/B/C – 1 шт;
- 2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 4705X в составе:

- 1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 4705X, размер: 70/75/80 – A/B/C/D/E или 85 – A/B/C/D или 90 – A/B/C – 1 шт;
- 2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 4706X в составе:

- 1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 4706X, размер: 70/75/80/85 – AA/A/B/C/D/E/F или 90 – AA/A/B/C/D/E или 95/100 – AA/A/B/C/D – 1 шт;
- 2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 4723X в составе:

- 1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 4723X, размер: 75/80/85/90/95/100 – B/C/D/E/F или 105/110 – B/C/D – 1 шт;
- 2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 4787X в составе:

- 1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 4787X, размер: 75/80/85/90/95 – A/B/C/D – 1 шт;
- 2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5300X в составе:

- 1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5300X, размер: 70/75/80/85/90 – A/B/C/D/E – 1 шт;
- 2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5301X в составе:

- 1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5301X, размер: 70/75/80/85/90 – A/B/C/D/E или 95 – A/B/C/D – 1 шт;
- 2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5315X в составе:

- 1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5315X, размер: 75/80/85/90/95/100 – A/B/C/D или 105/110/115 – A/B/C – 1 шт;
- 2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5322X в составе:

- 1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5322X, размер: 70/75/80/85/90/95/100 – A/B/C/D или 105/110/115 – A/B/C – 1 шт;
- 2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5349X в составе:

- 1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5349X, размер: 75/80/85/90/95/100 – A/B/C/D/E/F/G или 105/110/115 – A/B/C/D – 1 шт;

2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5398X в составе:

1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5398X, размер: 60/65 – В или 70/75/80/85/90/95 – А/В/С – 1 шт;

2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5706X в составе:

1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5706X, размер: 70/75/80/85 – АА/А/В/С/Д/Е/Ф или 90 – АА/А/В/С/Д/Е или 95/100 – АА/А/В/С/Д – 1 шт;

2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5712X в составе:

1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5712X, размер: 75/80/85/90/95/100 – А/В/С/Д/Е – 1 шт;

2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5722X в составе:

1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5722X, размер: 70/75/80/85/90/95/100 – А/В/С/Д или 105/110/115 – А/В/С – 1 шт;

2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5726X в составе:

1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5726X, размер: 75/80/85/90 – АА/А/В/С/Д или 95 – АА/А/В/С или 100/105/110 – АА/А/В – 1 шт;

2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5727X в составе:

1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5727X, размер: 75/80/85/90/95 – В/С/Д/Е – 1 шт;

2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5749X в составе:

1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5749X, размер: 75/80/85/90/95/100 – А/В/С/Д/Е/Ф или 105/110/115 – А/В/С/Д – 1 шт;

2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5750X в составе:

1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5750X, размер: 75/80/85/90/95/100/105 – А/В/С/Д/Е – 1 шт;

2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5751X в составе:

1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5751X, размер: 75/80/85/90/95 – АА/А/В/С/Д – 1 шт;

2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5752X в составе:

1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5752X, размер: 75/80/85/90 – А/В/С – 1 шт;

2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5754X в составе:

- 1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5754X, размер: 75/80/85/90 – A/B/C/D/E или 95 – A/B/C/D – 1 шт;
- 2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5763X в составе:

- 1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5763X, размер: 75/80/85/90/95/100 – A/B/C/D/E/F или 105/110/115 – A/B/C/D – 1 шт;
- 2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5765X в составе:

- 1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5765X, размер: XS/S/M/L/XL/XXL – A/B/C/D – 1 шт;
- 2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5768X в составе:

- 1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5768X, размер: S/M/L/XL – 1 шт;
- 2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5769X в составе:

- 1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5769X, размер: S/M/L/XL/XXL – 1 шт;
- 2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5776X в составе:

- 1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5776X, размер: 70/75/80/85/90/95 – AA/A/B/C/D – 1 шт;
- 2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5782X в составе:

- 1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5782X, размер: 75/80/85/90/95 – A/B/C/D/E – 1 шт;
- 2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5792X в составе:

- 1) Бюстгальтер медицинский послеоперационный, модель 5792X, размер: 70/75/80/85/90/95 – B/C/D – 1 шт;
- 2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

#### 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационно-технические характеристики бюстгалтеров соответствуют таблице 1.

Бюстгалтеры пригодны для применения при температуре от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ , относительной влажности воздуха до 85% и атмосферном давлении от 70 до 106 кПа.

Бюстгалтеры устойчивы к многократной чистке: стирки с использованием средств для стирки способами, указанными в эксплуатационной документации.

Бюстгалтеры изготовлены без косточек.

Воздухопроницаемость бюстгалтеров должна быть  $350 \pm 150 \text{ дм}^3 / \text{м}^2 \text{ с}$ . (Воздухопроницаемость определяют на точечных пробах бюстгалтера, размером  $80 \times 80 \pm 10 \text{ мм}$ )

Метод проверки воздухопроницаемости:

Определение воздухопроницаемости на приборе марки ATL-2 (FF-12)

Испытание проводят при разрежении под точечной пробой равной 49 Па (5 мм вод.ст.). Допускается испытание проводить при разрежении от 0 до 1960 Па (200 мм вод.ст.).

Для испытания применяют сменный столик с отверстием площадью  $10 \text{ см}^2$ . При необходимости могут быть использованы столики с другими отверстиями.

При испытании точечных проб ткани на столике с площадью отверстия  $10 \text{ см}^2$  ротаметр выбирают со шкалой 120-1200  $\text{дм}^3/\text{ч}$ .

Точечную пробу ткани укладывают на столике в расправленном виде без перекоса, лицевой стороной вверх и прижимают к столику кольцом при помощи рычага. При этом следят за установкой прижимной поверхности этого кольца в горизонтальном положении.

Тумблером включают электровентилятор. При этом загорается сигнальная лампочка и включается освещение ротаметров.

Поворотом рукоятки против часовой стрелки открывают выбранный ротаметр.

Устанавливают разрежение под точечной пробой. Для этого плавно открывают игольчатый клапан вращением рукоятки по часовой стрелке до смещения мениска на одно или два деления выше необходимой отметки, затем, вращая рукоятку в обратном направлении, устанавливают мениск на требуемую риску. В случае колебания поплавка ротаметра вверх и вниз необходимо вращать рукоятку игольчатого клапана более медленно и плавно.

Показание расхода воздуха снимают при установленном разрежении под точечной пробой до верхней плоскости поплавка ротаметра и отсчет показаний ротаметра производится с точностью половины цены деления ротаметра.


Закрывают ротаметр и игольчатый клапан.

Срок службы – 10 лет.





Т а б л и ц а 1

| Наименование модели бюстгальтера                                                             | Наименование параметра и его значение |              |          |                     |                       |                                       |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                              | Размер изделия по окружности, см      | Размер чашей | Масса, г | Форма               |                       |                                       |                           |
|                                                                                              |                                       |              |          | Карманы для вставок | Чашки                 | Регулируемые / нерегулируемые бретели | Съемные / несъемные чашки |
| 1                                                                                            | 2                                     | 3            | 6        | 7                   | 8                     | 9                                     | 10                        |
| <br>1199    | 70                                    | A/B/C/D/E    | 100      | Отсутствуют         | Бесшовные формованные | Регулируемые                          | Несъемные                 |
|                                                                                              | 75                                    | A/B/C/D/E    |          |                     |                       |                                       |                           |
|                                                                                              | 80                                    | A/B/C/D/E    |          |                     |                       |                                       |                           |
|                                                                                              | 85                                    | A/B/C/D/E    |          |                     |                       |                                       |                           |
|                                                                                              | 90                                    | A/B/C/D/E    |          |                     |                       |                                       |                           |
|                                                                                              | 95                                    | A/B/C/D/E    |          |                     |                       |                                       |                           |
|                                                                                              | 100                                   | A/B/C/D/E    |          |                     |                       |                                       |                           |
|                                                                                              | 105                                   | A/B/C/D/E    |          |                     |                       |                                       |                           |
|                                                                                              | 110                                   | A/B/C        |          |                     |                       |                                       |                           |
|                                                                                              | 115                                   | A/B/C        |          |                     |                       |                                       |                           |
| <br>4705X | 70                                    | A/B/C/D/E    | 71       | С обеих сторон      | Сшитые                | Регулируемые                          | Несъемные                 |
|                                                                                              | 75                                    | A/B/C/D/E    |          |                     |                       |                                       |                           |
|                                                                                              | 80                                    | A/B/C/D/E    |          |                     |                       |                                       |                           |
|                                                                                              | 85                                    | A/B/C/D      |          |                     |                       |                                       |                           |
|                                                                                              | 90                                    | A/B/C        |          |                     |                       |                                       |                           |
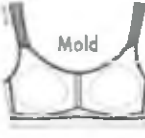
|                                                                                                  |     |                |    |                   |                          |              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----|-------------------|--------------------------|--------------|-----------|
|  <p>4706X</p>   | 70  | AA/A/B/C/D/E/F | 71 | С обеих<br>сторон | Бесшовные<br>формованные | Регулируемые | Несъемные |
|                                                                                                  | 75  | AA/A/B/C/D/E/F |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                                  | 80  | AA/A/B/C/D/E/F |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                                  | 85  | AA/A/B/C/D/E/F |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                                  | 90  | AA/A/B/C/D/E   |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                                  | 95  | AA/A/B/C/D     |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                                  | 100 | AA/A/B/C/D     |    |                   |                          |              |           |
|  <p>4723X</p>   | 75  | B/C/D/E/F      | 71 | С обеих<br>сторон | Сшитые                   | Регулируемые | Несъемные |
|                                                                                                  | 80  | B/C/D/E/F      |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                                  | 85  | B/C/D/E/F      |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                                  | 90  | B/C/D/E/F      |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                                  | 95  | B/C/D/E/F      |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                                  | 100 | B/C/D/E/F      |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                                  | 105 | B/C/D          |    |                   |                          |              |           |
| <p>4787X</p>                                                                                     | 75  | A/B/C/D        | 71 | С обеих<br>сторон | Бесшовные<br>формованные | Регулируемые | Несъемные |
|                                                                                                  | 80  | A/B/C/D        |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                                  | 85  | A/B/C/D        |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                                  | 90  | A/B/C/D        |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                                  | 95  | A/B/C/D        |    |                   |                          |              |           |
|  <p>5300X</p> | 70  | A/B/C/D/E      | 80 | С обеих<br>сторон | Бесшовные<br>формованные | Регулируемые | Несъемные |
|                                                                                                  | 75  | A/B/C/D/E      |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                                  | 80  | A/B/C/D/E      |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                                  | 85  | A/B/C/D/E      |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                                  | 90  | A/B/C/D/E      |    |                   |                          |              |           |

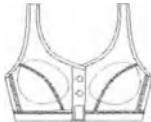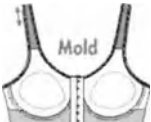


|                                                                                              |     |           |     |                   |                          |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-------------------|--------------------------|----------------|-----------|
| <br>5301X   | 70  | A/B/C/D/E | 71  | С обеих<br>сторон | Сшитые                   | Регулируемые   | Несъемные |
|                                                                                              | 75  | A/B/C/D/E |     |                   |                          |                |           |
|                                                                                              | 80  | A/B/C/D/E |     |                   |                          |                |           |
|                                                                                              | 85  | A/B/C/D/E |     |                   |                          |                |           |
|                                                                                              | 90  | A/B/C/D/E |     |                   |                          |                |           |
|                                                                                              | 95  | A/B/C/D   |     |                   |                          |                |           |
| <br>5315X   | 75  | A/B/C/D   | 100 | С обеих<br>сторон | Сшитые                   | Нерегулируемые | Несъемные |
|                                                                                              | 80  | A/B/C/D   |     |                   |                          |                |           |
|                                                                                              | 85  | A/B/C/D   |     |                   |                          |                |           |
|                                                                                              | 90  | A/B/C/D   |     |                   |                          |                |           |
|                                                                                              | 95  | A/B/C/D   |     |                   |                          |                |           |
|                                                                                              | 100 | A/B/C/D   |     |                   |                          |                |           |
|                                                                                              | 105 | A/B/C     |     |                   |                          |                |           |
|                                                                                              | 110 | A/B/C     |     |                   |                          |                |           |
| <br>5322X | 70  | A/B/C/D   | 100 | С обеих<br>сторон | Бесшовные<br>формованные | Регулируемые   | Несъемные |
|                                                                                              | 75  | A/B/C/D   |     |                   |                          |                |           |
|                                                                                              | 80  | A/B/C/D   |     |                   |                          |                |           |
|                                                                                              | 85  | A/B/C/D   |     |                   |                          |                |           |
|                                                                                              | 90  | A/B/C/D   |     |                   |                          |                |           |
|                                                                                              | 95  | A/B/C/D   |     |                   |                          |                |           |
|                                                                                              | 100 | A/B/C/D   |     |                   |                          |                |           |
|                                                                                              | 105 | A/B/C     |     |                   |                          |                |           |
|                                                                                              | 110 | A/B/C     |     |                   |                          |                |           |
|                                                                                              | 115 | A/B/C     |     |                   |                          |                |           |

|                                                                                                     |            |                       |           |                           |                                  |                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|
| <br><b>5349X</b>   | <b>75</b>  | <b>A/B/C/D/E/F/G</b>  | <b>71</b> | <b>С обеих<br/>сторон</b> | <b>Сшитые</b>                    | <b>Регулируемые</b> | <b>Несъемные</b> |
|                                                                                                     | <b>80</b>  | <b>A/B/C/D/E/F/G</b>  |           |                           |                                  |                     |                  |
|                                                                                                     | <b>85</b>  | <b>A/B/C/D/E/F/G</b>  |           |                           |                                  |                     |                  |
|                                                                                                     | <b>90</b>  | <b>A/B/C/D/E/F/G</b>  |           |                           |                                  |                     |                  |
|                                                                                                     | <b>95</b>  | <b>A/B/C/D/E/F/G</b>  |           |                           |                                  |                     |                  |
|                                                                                                     | <b>100</b> | <b>A/B/C/D/E/F/G</b>  |           |                           |                                  |                     |                  |
|                                                                                                     | <b>105</b> | <b>A/B/C/D</b>        |           |                           |                                  |                     |                  |
|                                                                                                     | <b>110</b> | <b>A/B/C/D</b>        |           |                           |                                  |                     |                  |
|                                                                                                     | <b>115</b> | <b>A/B/C/D</b>        |           |                           |                                  |                     |                  |
| <br><b>5398X</b>   | <b>60</b>  | <b>B</b>              | <b>74</b> | <b>С обеих<br/>сторон</b> | <b>Сшитые</b>                    | <b>Регулируемые</b> | <b>Несъемные</b> |
|                                                                                                     | <b>65</b>  | <b>B</b>              |           |                           |                                  |                     |                  |
|                                                                                                     | <b>70</b>  | <b>A/B/C</b>          |           |                           |                                  |                     |                  |
|                                                                                                     | <b>75</b>  | <b>A/B/C</b>          |           |                           |                                  |                     |                  |
|                                                                                                     | <b>80</b>  | <b>A/B/C</b>          |           |                           |                                  |                     |                  |
|                                                                                                     | <b>85</b>  | <b>A/B/C</b>          |           |                           |                                  |                     |                  |
|                                                                                                     | <b>90</b>  | <b>A/B/C</b>          |           |                           |                                  |                     |                  |
|                                                                                                     | <b>95</b>  | <b>A/B/C</b>          |           |                           |                                  |                     |                  |
| <br><b>5706X</b> | <b>70</b>  | <b>AA/A/B/C/D/E/F</b> | <b>71</b> | <b>С обеих<br/>сторон</b> | <b>Бесшовные<br/>формованные</b> | <b>Регулируемые</b> | <b>Несъемные</b> |
|                                                                                                     | <b>75</b>  | <b>AA/A/B/C/D/E/F</b> |           |                           |                                  |                     |                  |
|                                                                                                     | <b>80</b>  | <b>AA/A/B/C/D/E/F</b> |           |                           |                                  |                     |                  |
|                                                                                                     | <b>85</b>  | <b>AA/A/B/C/D/E/F</b> |           |                           |                                  |                     |                  |
|                                                                                                     | <b>90</b>  | <b>AA/A/B/C/D/E</b>   |           |                           |                                  |                     |                  |
|                                                                                                     | <b>95</b>  | <b>AA/A/B/C/D</b>     |           |                           |                                  |                     |                  |
|                                                                                                     | <b>100</b> | <b>AA/A/B/C/D</b>     |           |                           |                                  |                     |                  |

|                                                                                              |     |            |    |                   |                          |              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|-------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| <br>5712X   | 75  | A/B/C/D/E  | 71 | С обеих<br>сторон | Сшитые                   | Регулируемые | Несъемные |
|                                                                                              | 80  | A/B/C/D/E  |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 85  | A/B/C/D/E  |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 90  | A/B/C/D/E  |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 95  | A/B/C/D/E  |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 100 | A/B/C/D/E  |    |                   |                          |              |           |
| <br>5722X   | 70  | A/B/C/D    | 71 | С обеих<br>сторон | Бесшовные<br>формованные | Регулируемые | Несъемные |
|                                                                                              | 75  | A/B/C/D    |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 80  | A/B/C/D    |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 85  | A/B/C/D    |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 90  | A/B/C/D    |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 95  | A/B/C/D    |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 100 | A/B/C/D    |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 105 | A/B/C      |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 110 | A/B/C      |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 115 | A/B/C      |    |                   |                          |              |           |
| <br>5726X | 75  | AA/A/B/C/D | 65 | С обеих<br>сторон | Бесшовные<br>формованные | Регулируемые | Несъемные |
|                                                                                              | 80  | AA/A/B/C/D |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 85  | AA/A/B/C/D |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 90  | AA/A/B/C/D |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 95  | AA/A/B/C   |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 100 | AA/A/B     |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 105 | AA/A/B     |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 110 | AA/A/B     |    |                   |                          |              |           |

|                                                                                              |     |             |    |                   |        |              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----|-------------------|--------|--------------|-----------|
| <br>5727X   | 75  | B/C/D/E     | 75 | С обеих<br>сторон | Сшитые | Регулируемые | Несъемные |
|                                                                                              | 80  | B/C/D/E     |    |                   |        |              |           |
|                                                                                              | 85  | B/C/D/E     |    |                   |        |              |           |
|                                                                                              | 90  | B/C/D/E     |    |                   |        |              |           |
|                                                                                              | 95  | B/C/D/E     |    |                   |        |              |           |
| <br>5749X   | 75  | A/B/C/D/E/F | 74 | С обеих<br>сторон | Сшитые | Регулируемые | Несъемные |
|                                                                                              | 80  | A/B/C/D/E/F |    |                   |        |              |           |
|                                                                                              | 85  | A/B/C/D/E/F |    |                   |        |              |           |
|                                                                                              | 90  | A/B/C/D/E/F |    |                   |        |              |           |
|                                                                                              | 95  | A/B/C/D/E/F |    |                   |        |              |           |
|                                                                                              | 100 | A/B/C/D/E/F |    |                   |        |              |           |
|                                                                                              | 105 | A/B/C/D     |    |                   |        |              |           |
|                                                                                              | 110 | A/B/C/D     |    |                   |        |              |           |
| <br>5750X  | 75  | A/B/C/D/E   | 80 | С обеих<br>сторон | Сшитые | Регулируемые | Несъемные |
|                                                                                              | 80  | A/B/C/D/E   |    |                   |        |              |           |
|                                                                                              | 85  | A/B/C/D/E   |    |                   |        |              |           |
|                                                                                              | 90  | A/B/C/D/E   |    |                   |        |              |           |
|                                                                                              | 95  | A/B/C/D/E   |    |                   |        |              |           |
|                                                                                              | 100 | A/B/C/D/E   |    |                   |        |              |           |
|                                                                                              | 105 | A/B/C/D/E   |    |                   |        |              |           |
| <br>5751X | 75  | AA/A/B/C/D  | 74 | С обеих<br>сторон | Сшитые | Регулируемые | Несъемные |
|                                                                                              | 80  | AA/A/B/C/D  |    |                   |        |              |           |
|                                                                                              | 85  | AA/A/B/C/D  |    |                   |        |              |           |
|                                                                                              | 90  | AA/A/B/C/D  |    |                   |        |              |           |
|                                                                                              | 95  | AA/A/B/C/D  |    |                   |        |              |           |

|                                                                                            |     |             |    |                   |                          |              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----|-------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| <br>5752X | 75  | A/B/C       | 74 | С обеих<br>сторон | Бесшовные<br>формованные | Регулируемые | Несъемные |
|                                                                                            | 80  | A/B/C       |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                            | 85  | A/B/C       |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                            | 90  | A/B/C       |    |                   |                          |              |           |
| <br>5754X | 75  | A/B/C/D/E   | 71 | С обеих<br>сторон | Сшитые                   | Регулируемые | Несъемные |
|                                                                                            | 80  | A/B/C/D/E   |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                            | 85  | A/B/C/D/E   |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                            | 90  | A/B/C/D/E   |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                            | 95  | A/B/C/D     |    |                   |                          |              |           |
| <br>5763X | 75  | A/B/C/D/E/F | 72 | С обеих<br>сторон | Сшитые                   | Регулируемые | Несъемные |
|                                                                                            | 80  | A/B/C/D/E/F |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                            | 85  | A/B/C/D/E/F |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                            | 90  | A/B/C/D/E/F |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                            | 95  | A/B/C/D/E/F |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                            | 100 | A/B/C/D/E/F |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                            | 105 | A/B/C/D     |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                            | 110 | A/B/C/D     |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                            | 115 | A/B/C/D     |    |                   |                          |              |           |
| 5765X                                                                                      | XS  | A/B/C/D     | 75 | С обеих<br>сторон | Бесшовные<br>формованные | Регулируемые | Несъемные |
|                                                                                            | S   | A/B/C/D     |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                            | M   | A/B/C/D     |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                            | L   | A/B/C/D     |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                            | XL  | A/B/C/D     |    |                   |                          |              |           |
|                                                                                            | XXL | A/B/C/D     |    |                   |                          |              |           |
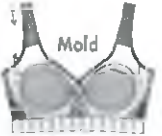
|                                                                                              |     |            |     |                   |                          |              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| <br>5768X   | S   | -          | 100 | С обеих<br>сторон | Бесшовные<br>формованные | Регулируемые | Съемные   |
|                                                                                              | M   | -          |     |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | L   | -          |     |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | XL  | -          |     |                   |                          |              |           |
| <br>5769X   | S   | -          | 100 | С обеих<br>сторон | Бесшовные<br>формованные | Регулируемые | Съемные   |
|                                                                                              | M   | -          |     |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | L   | -          |     |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | XL  | -          |     |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | XXL | -          |     |                   |                          |              |           |
| <br>5776X   | 70  | AA/A/B/C/D | 72  | С обеих<br>сторон | Бесшовные<br>формованные | Регулируемые | Несъемные |
|                                                                                              | 75  | AA/A/B/C/D |     |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 80  | AA/A/B/C/D |     |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 85  | AA/A/B/C/D |     |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 90  | AA/A/B/C/D |     |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 95  | AA/A/B/C/D |     |                   |                          |              |           |
| <br>5782X  | 75  | A/B/C/D/E  | 75  | С обеих<br>сторон | Сшитые                   | Регулируемые | Несъемные |
|                                                                                              | 80  | A/B/C/D/E  |     |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 85  | A/B/C/D/E  |     |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 90  | A/B/C/D/E  |     |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 95  | A/B/C/D/E  |     |                   |                          |              |           |
| <br>5792X | 70  | B/C/D      | 80  | С обеих<br>сторон | Сшитые                   | Регулируемые | Несъемные |
|                                                                                              | 75  | B/C/D      |     |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 80  | B/C/D      |     |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 85  | B/C/D      |     |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 90  | B/C/D      |     |                   |                          |              |           |
|                                                                                              | 95  | B/C/D      |     |                   |                          |              |           |

Примечание – Допуски на все характеристики -  $\pm 15\%$ .

Класс компрессии – 0.

| Модель | Поверхностная плотность гр/куб.м | Допустимая усадка после стирки % | Растяжимость до стирки % | Растяжимость после стирки % | Остаточная деформация при растяжении до стирки % | Остаточная деформация при растяжении после стирки % |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1199   | 105 -115                         | не более 3                       | 11- 21                   | 15- 25                      | max. 3                                           | max. 4                                              |
| 4705X  | 66- 74                           | не более 4                       | 14- 20                   | 17- 23                      | max. 3                                           | max. 5                                              |
| 4706X  | 147- 157                         | не более 5                       | 111- 150                 | 120- 159                    | max. 8                                           | max. 10                                             |
| 4723X  | 133- 147                         | не более 6                       | 10- 30                   | 12- 32                      | max. 3                                           | max. 4                                              |
| 4769X  | 147- 163                         | не более 7                       | 25- 35                   | 27- 37                      | max. 3                                           | max. 4                                              |
| 4787X  | 85 - 93                          | не более 3                       | 77- 104                  | 79- 106                     | max. 5                                           | max. 7                                              |
| 5300X  | 175- 205                         | не более 5                       | 135- 165                 | 140- 170                    | max. 10                                          | max. 11                                             |
| 5301X  | 143- 157                         | не более 8                       | 10- 30                   | 12- 23                      | max. 3                                           | max. 5                                              |
| 5315X  | 187- 103                         | не более 5                       | 10- 30                   | 12-23                       | max. 5                                           | max. 7                                              |
| 5322X  | 200- 240                         | не более 7                       | 80- 110                  | 82- 112                     | max. 3                                           | max. 4                                              |
| 5349X  | 201-258                          | не более 5                       | 90-110                   | 95-115                      | max. 5                                           | max. 7                                              |
| 5398X  | 81- 89                           | не более 5                       | 10-20                    | 13-23                       | max. 3                                           | max. 6                                              |
| 5706X  | 68- 78                           | не более 5                       | 210- 250                 | 230-270                     | max. 18                                          | max. 25                                             |
| 5712X  | 147- 163                         | не более 7                       | 25- 35                   | 27- 37                      | max. 3                                           | max. 4                                              |
| 5722X  | 200- 240                         | не более 7                       | 80- 110                  | 82- 112                     | max. 3                                           | max. 4                                              |
| 5726X  | 201-258                          | не более 3                       | 190-210                  | 195-215                     | max. 6                                           | max. 8                                              |
| 5727X  | 105 -115                         | не более 3                       | 11- 21                   | 15- 25                      | max. 3                                           | max. 4                                              |
| 5749X  | 187- 103                         | не более 5                       | 10- 30                   | 12-32                       | max. 5                                           | max. 7                                              |
| 5750X  | 68- 78                           | не более 5                       | 210- 250                 | 230-270                     | max. 18                                          | max. 25                                             |
| 5751X  | 187- 103                         | не более 5                       | 10- 30                   | 12-32                       | max. 5                                           | max. 7                                              |
| 5752X  | 68- 78                           | не более 5                       | 210- 250                 | 230-270                     | max. 18                                          | max. 25                                             |
| 5754X  | 147- 163                         | не более 7                       | 25- 35                   | 27- 37                      | max. 3                                           | max. 4                                              |
| 5763X  | 147- 163                         | не более 7                       | 25- 35                   | 27- 37                      | max. 3                                           | max. 4                                              |
| 5765X  | 247- 273                         | не более 5                       | 30-50                    | 35-55                       | max. 4                                           | max. 6                                              |
| 5768X  | 250-270                          | не более 5                       | 200-240                  | 230- 270                    | max. 20                                          | max. 30                                             |
| 5769X  | 250-270                          | не более 5                       | 200-240                  | 230- 270                    | max. 20                                          | max. 30                                             |
| 5776X  | 147- 157                         | не более 5                       | 111- 150                 | 120- 159                    | max. 8                                           | max. 10                                             |
| 5782X  | 147- 163                         | не более 7                       | 130-150                  | 135-155                     | max. 3                                           | max. 4                                              |
| 5792X  | 103-187                          | не более 5                       | 10- 30                   | 12-23                       | max. 5                                           | max. 7                                              |
| 5798X  | 86- 95                           | не более 5                       | 170- 230                 | 180- 240                    | max. 15                                          | max. 20                                             |

## 5 МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Бюстгальтеры изготавливаются из материалов, представленных в таблице 2.  
Т а б л и ц а 2

| №  | Наименование модели бюстгальтера | Материал                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1199                             | 55% полиэстер торговой марки ОЕКО-ТЕКС ®, 35% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 10% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                                                              |
| 2  | 4705X                            | 31% полиэстер ОЕКО-ТЕКС ®, 30% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 22% хлопок ОЕКО-ТЕКС ®, 9% полиуретан ОЕКО-ТЕКС ®, 8% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                           |
| 3  | 4706X                            | 47% полиэстер ОЕКО-ТЕКС ®, 39% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 14% эластан ОЕКО-ТЕКС ®<br>Формованная чашка: 52% полиуретан ОЕКО-ТЕКС ®, 48% полиэстер ОЕКО-ТЕКС ® |
| 4  | 4723X                            | 38% полиэстер ОЕКО-ТЕКС ®, 37% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 16% хлопок, 9% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                                                                  |
| 5  | 4787X                            | 80% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 20% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                                                                                                        |
| 6  | 5300X                            | 80% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 20% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                                                                                                        |
| 7  | 5301X                            | 97% хлопок ОЕКО-ТЕКС ®, 2% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 1% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                                                                                  |
| 8  | 5315X                            | 90% хлопок ОЕКО-ТЕКС ®, 10% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                                                                                                          |
| 9  | 5322X                            | 45% полиэстер ОЕКО-ТЕКС ®, 45% вискозное полотно марки MICROMODAL, 10% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                                                               |
| 10 | 5349X                            | 50% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 30% полиэстер ОЕКО-ТЕКС ®, 10% эластан ОЕКО-ТЕКС ®, 5% хлопок ОЕКО-ТЕКС ®, 5% вискоза ОЕКО-ТЕКС ®                              |
| 11 | 5398X                            | 60% полиэстер ОЕКО-ТЕКС ®, 20% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 15% хлопок ОЕКО-ТЕКС ®, 5% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                                                      |



|    |       |                                                                                                                             |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 5706X | 65% полиэстер ОЕКО-ТЕКС ®, 25% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 10% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                                                |
|    |       | Формованная чаша: 52% полиуретан ОЕКО-ТЕКС ®, 48% полиэстер ОЕКО-ТЕКС ®                                                     |
| 13 | 5712X | 75% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 20% хлопок ОЕКО-ТЕКС ®, 5% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                                                    |
| 14 | 5722X | 45% полиэстер ОЕКО-ТЕКС ®, 45% вискозное полотно марки MICROMODAL, 10% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                                  |
| 15 | 5726X | 75% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 25% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                                                                           |
| 16 | 5727X | 74% полиэстер ОЕКО-ТЕКС ®, 22% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 4% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                                                 |
| 17 | 5749X | 50% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 30% полиэстер ОЕКО-ТЕКС ®, 10% эластан ОЕКО-ТЕКС ®, 5% хлопок ОЕКО-ТЕКС ®, 5% вискоза ОЕКО-ТЕКС ® |
| 18 | 5750X | 46% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 40% полиэстер ОЕКО-ТЕКС ®, 14% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                                                |
| 19 | 5751X | 36% полиэстер ОЕКО-ТЕКС ®, 31% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 25% хлопок ОЕКО-ТЕКС ®, 8% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                         |
| 20 | 5752X | 58% полиэстер ОЕКО-ТЕКС ®, 27% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 15% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                                                |
| 21 | 5754X | 65% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 30% хлопок ОЕКО-ТЕКС ®, 5% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                                                    |
| 22 | 5763X | 72% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 16% хлопок ОЕКО-ТЕКС ®, 12% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                                                   |
| 23 | 5765X | 85% хлопок ОЕКО-ТЕКС ®, 8% эластан ОЕКО-ТЕКС ®, 7% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®                                                     |
| 24 | 5768X | 88% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 12% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                                                                           |
| 25 | 5769X | 97% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 3% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                                                                            |

|    |       |                                                                                                     |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 5776X | 79% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 21% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                                                   |
|    |       | Формованная чашка: 52% полиуретан ОЕКО-ТЕКС ®, 48% полиэстер ОЕКО-ТЕКС ®                            |
| 27 | 5782X | 72% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 23% хлопок ОЕКО-ТЕКС ®, 5% эластан ОЕКО-ТЕКС ®                            |
| 28 | 5792X | 50% полиэстер ОЕКО-ТЕКС ®, 27% хлопок ОЕКО-ТЕКС ®, 21% полиамид ОЕКО-ТЕКС ®, 2% эластан ОЕКО-ТЕКС ® |

Для крючков, проушин и молний застежек используется нержавеющая сталь 420SS.

Для пуговиц застежек используется ABS пластик PA200.

При изготовлении бюстгалтеров используются красители: сиреневый, белый, черный, серый, лиловый, перламутровый, розовый, красный, все красители торговой марки ОЕКО-ТЕКС ®.

Все цветовые варианты обеспечиваются путем смешения основных красителей.

## 6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮСТГАЛЬТЕРА

6.1 Откройте упаковку и проверьте бюстгальтер на наличие каких-либо механических повреждений.

При обнаружении каких-либо проблем немедленно свяжитесь с уполномоченным представителем производителя.



### **Предупреждение**

---

• Утилизация упаковочных материалов должна проводиться в соответствии с требованиями Вашего местного законодательства.

---

6.2 Изделие предназначено для использования женщинами, перенесшими операцию на груди.

6.3 Изделие обеспечивает иммобилизацию молочной железы и стабилизацию формы груди, что способствует ускоренному заживлению и нормализации лимфооттока.

Некоторые модели бюстгалтеров оснащены карманами для вставок. Карманы для вставок не предусмотрены для фиксации и крепления экзопротезов и используются для вставок, имитирующих форму груди.

6.4 Порядок использования:

- Перед использованием проверьте изделие на отсутствие загрязнений и разрывов.
- При использовании изделия поместите вставку в специальный карман.
- Наденьте изделие, зафиксируйте его на теле с помощью застежки.
- Убедитесь, что изделие зафиксировано не слишком туго и отсутствуют неприятные ощущения.

---

## 7 ПРАВИЛА УХОДА И ЧИСТКИ

При загрязнении изделия необходимо произвести его стирку способом и в режиме, указанных символами по уходу (см. п.8.2). Запрещено использовать отбеливатели и применять чистку с химическими препаратами.

Запрещено использовать отжим при стирке изделия в стиральной машине.

После стирки произвести сушку изделия на ровной поверхности.

## 8 МАРКИРОВКА

### 8.1 Маркировка, наносимая на бирку, пришиваемую к бюстгальтеру:

- модель бюстгальтера;
- наименование и (или) логотип производителя;
- место производства;
- серийный номер;
- состав ткани;
- размер;
- символы по уходу (см. п.6.1.2);
- адрес производителя;
- СЕ маркировка;
- Штрих-код.

### 8.2 Символы по уходу, наносимые на бирку, пришиваемую к бюстгальтеру:

| Наименование модели бюстгальтера | Стирка                                                                              | Отбеливание                                                                         | Сушка                                                                               | Глажение и прессование                                                                | Профессиональный уход                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1199                             |  |  |  |  |  |
| 4705X                            |  |  |  |  |  |
| 4706X                            |  |  |  |  |  |
| 4723X                            |  |  |  |  |  |
| 4787X                            |  |  |  |  |  |
| 5300X                            |  |  |  |  |  |
| 5301X                            |  |  |  |  |  |
| 5315X                            |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5322X |    |    |    |    |    |
| 5349X |    |    |    |    |    |
| 5398X |    |    |    |    |    |
| 5706X |    |    |    |    |    |
| 5712X |    |    |    |    |    |
| 5722X |    |    |    |    |    |
| 5726X |    |    |    |    |    |
| 5727X |   |   |   |   |   |
| 5749X |  |  |  |  |  |
| 5750X |  |  |  |  |  |
| 5751X |  |  |  |  |  |
| 5752X |  |  |  |  |  |
| 5754X |  |  |  |  |  |
| 5763X |  |  |  |  |  |
| 5765X |  |  |  |  |  |
| 5768X |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5769X |  |  |  |  |  |
| 5776X |  |  |  |  |  |
| 5782X |  |  |  |  |  |
| 5792X |  |  |  |  |  |

### 8.3 Маркировка, наносимая на упаковку бюстгалтера:

- наименование изделия;
- модель бюстгалтера;
- логотип производителя;
- серийный номер;
- дата изготовления;
- состав ткани;
- размер;
- наименование и адрес производителя;
- **место производства;**
- СЕ маркировка;
- Штрих-код;
- QR код;
- Указания по утилизации;
- Данные об уполномоченном представителе;
- Номер и дата регистрационного удостоверения;
- **Указание на способ стирки изделия;**
- **Указание на запрет использования отбеливающих средств;**
- **Указание на способ сушки изделия;**
- **Указание на запрет глажения изделия;**
- **Указание по профессиональной сухой чистке;**
- **Символ «беречь от влаги».**

#### 8.4 Расшифровка всех символов маркировки:

| Символ                                                                              | Значение                                                 | Описание                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | Серийный номер                                           | Серийный номер изделия                                |
|    | Производитель                                            | Наименование производителя изделия                    |
|    | Дата производства                                        | Дата производства изделия                             |
|    | Ручная стирка, максимальная температура 40°C             | Указание на способ стирки изделия                     |
|    | Максимальная температура стирки 30°C<br>Обычный режим    | Указание на способ стирки изделия                     |
|   | Максимальная температура стирки 30°C<br>Деликатный режим | Указание на способ стирки изделия                     |
|  | Максимальная температура стирки 40°C<br>Деликатный режим | Указание на способ стирки изделия                     |
|  | Отбеливание запрещено                                    | Указание на запрет использования отбеливающих средств |
|  | Барабанная сушка запрещена                               | Указание на способ сушки изделия                      |
|  | Глажение запрещено                                       | Указание на запрет глажения изделия                   |
|  | Профессиональная сухая чистка запрещена                  | Указание по профессиональной сухой чистке             |
|  | СЕ маркировка                                            | СЕ маркировка                                         |
|  | Беречь от влаги                                          | Указание на запрет воздействия влаги                  |



## 9 УПАКОВКА

Бюстгальтер упаковывают в коробку с инструкцией по эксплуатации.

Коробка должна быть оклеена полиэтиленовой лентой с липким слоем или запломбирована так, чтобы упаковка не могла быть вскрыта без нарушения целостности.

## 10 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

### 10.1 Требования безопасности

Эксплуатационная пригодность в соответствии с IEC 62366.

Материалы бюстгальтера должны быть биологически безопасными и соответствовать требованиям группы стандартов ISO 10993.

### 10.2 Охрана окружающей среды

Материалы, используемые при изготовлении бюстгальтера, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания её срока.

Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате:

- аварийных утечек (россыпей) производственных материалов;
- неорганизованного захоронения отходов на территории предприятия-изготовителя или вне его;
- произвольной свалки отходов в непредназначенных для этой цели местах.

## 11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

### 11.1 Условия транспортирования

Транспортирование бюстгальтера может осуществляться всеми видами крытых транспортных средств и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортирование бюстгальтера морским транспортом должно производиться в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами и мелкая отправка.

Бюстгальтер, при транспортировании, должен быть устойчив к климатическим воздействиям, при температуре от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ , относительной влажности воздуха до 90% и атмосферным давлением от 70 до 106 кПа.

Бюстгальтер, при транспортировании, должен быть устойчив к механическим воздействиям, с параметрами:

- вибрационные нагрузки – диапазон частот 10-55 Гц с амплитудой перемещения 0,15 мм;
- ударные нагрузки – пиковое ударное ускорение  $100 \text{ мс}^{-2}$  с длительностью действия 16 мс.

### 11.2 Условия хранения

Бюстгальтер, при хранении, должен быть устойчив к климатическим воздействиям, при температуре от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ , относительной влажности воздуха до 90% и атмосферным давлением от 70 до 106 кПа.

Условия хранения:

- Беречь от воды.

## 12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Бюстгальтер техническому обслуживанию, кроме стирки, и ремонту не подлежит.

### 13 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация бюстгальтера должна осуществляться согласно действующим на территории РФ правилам утилизации, по классу отходов А, относится к классу А – эпидемиологические безопасные отходы.

Бюстгальтер подлежит утилизации в случае:

- окончания срока службы;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью пользователя и свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

Утилизации так же подлежит вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, дерево, полиэтилен и пластмасса в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации упаковки.

#### 14 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

**Срок службы – 10 лет.**

На бюстгальтер дается гарантия сроком на 12 месяцев со дня продажи со склада завода-изготовителя.

Гарантируется, что бюстгальтер не имеет дефектов, связанных с производством и качеством производственных материалов.

Производитель или уполномоченный представитель производителя на территории РФ не несет ответственности за любой личный/материальный ущерб, вызванный ошибочным использованием, эксплуатацией для целей, отличных от предполагаемой цели, и небрежностью при чистке.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДПАРТНЕР» (ООО «МЕДПАРТНЕР») по адресу 194100, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д.68, литер Н, офис 268; телефон +7 812 200 94 15; email hi@medpartner.pro.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Категория изделия \_\_\_\_\_  
 Производитель \_\_\_\_\_  
 Вариант исполнения \_\_\_\_\_  
 Серийный номер/арт. \_\_\_\_\_  
 Дата продажи \_\_\_\_\_  
 Организация продавец \_\_\_\_\_  
 Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штмп  
 о продаже

Изделие проверено, повреждений не имеет.  
 С правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Срок гарантии – 12 месяцев со дня продажи со склада завода-изготовителя.

По вопросам гарантии обращаться: Общество с ограниченной ответственностью  
 «МЕДПАРТНЕР» (ООО «МЕДПАРТНЕР») по адресу 194100, г. Санкт-Петербург, Большой  
 Сампсониевский проспект, д.68, литер Н, офис 268; телефон +7 812 200 94 15; email  
 hi@medpartner.pro.

**ВНИМАНИЕ!** Следите за правильным заполнением гарантийного талона. Серийный номер  
 изделия/артикул должен в точности соответствовать номеру в талоне. Все графы  
 талона (за исключением граф для гарантийного центра) должны быть заполнены.

При неточном или неполном заполнении талона гарантия на изделие считается  
 утраченной.

Гарантия производителя осуществляется в соответствии с ГК РФ на общих основаниях.  
 Изделие не должно носить следов механического или термического воздействий, а также  
 следов воздействия различных химических агентов. Эксплуатация изделия допускается  
 только в соответствии с руководством по эксплуатации к изделию.

### ОТМЕТКА О ГАРАНТИИ

| ДАТА | ОПИСАНИЕ | ГАРАНТИЙНЫЙ ЦЕНТР |
|------|----------|-------------------|
|      |          |                   |

---

## 15 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае рекламаций на изделие обращаться: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДПАРТНЕР» (ООО «МЕДПАРТНЕР») по адресу 194100, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д.68, литер Н, офис 268; телефон +7 812 200 94 15; email hi@medpartner.pro.



Перечень нормативной документации, которая применяется производителем для подтверждения соответствия:

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EN 1041</b> , Информация, предоставляемая производителем медицинских изделий                                                                                                                         |
| <b>ISO 13485</b> , Медицинские изделия – Системы менеджмента качества – Требования для целей регулирования                                                                                              |
| <b>ISO 14971</b> , Медицинские изделия – Применение менеджмента риска к медицинским изделиям                                                                                                            |
| <b>ISO 15223-1</b> , Медицинские изделия — Символы, которые будут использоваться на этикетках медицинских изделий, маркировка и информация, которую необходимо предоставить — Часть 1: Общие требования |
| <b>IEC 62366</b> , Медицинские изделия – Применение эксплуатационной пригодности                                                                                                                        |
| <b>ISO 10993-1</b> , Биологическая оценка медицинских изделий – Часть 1: Оценка и тестирование в рамках процесса менеджмента риска                                                                      |
| <b>ISO 10993-5</b> , Биологическая оценка медицинских изделий – Часть 5: Тесты на цитотоксичность методом <i>in vitro</i>                                                                               |
| <b>ISO 10993-10</b> , Биологическая оценка медицинских изделий – Часть 10: Тесты на раздражение и сенсибилизацию кожи                                                                                   |
| <b>EN 980</b> — Символы, используемые на маркировке медицинских изделий                                                                                                                                 |

Город: Розенхайм (Rosenheim)  
Страна: Германия/Бавария (Germany/Bavaria)

Настоящим подтверждаю, что приложенный документ, заверенный печатью, был подписан в моем присутствии

Г-ном Йоханнес Вебер-Унгер (Johannes Weber Unger),  
дата рождения: 16 августа 1982 года,  
место жительства: Пинзенауерштрассе (Pienzenauerstr.) 15, 6330 Куфштайн  
(Kufstein), Австрия (Austria),  
лично мне известным. Нотариус в отставке.

действующим от имени

**Анита Др. Хельбиг ГмбХ**  
(Anita Dr. Helbig GmbH)  
с зарегистрированным офисом в Графенштрассе (Grafenstr.) 23, 83098 Бранненбург  
(Brannenburg), Германия (Germany)

в качестве Генерального директора данной компании (Geschäftsführer).


После проверки коммерческого реестра я заявляю, что компания Анита Др. Хельбиг ГмбХ (Anita Dr. Helbig GmbH) зарегистрирована в коммерческом реестре Муниципального суда Траунштайна под номером HRB 746 и что г-н Йоханнес Вебер-Унгер (Johannes Weber Unger) имеет право действовать лично в качестве законного представителя этой компании.

Розенхайм (Rosenheim), 26 января 2023 г.

Печать:  
Верена Шлиттенбауэр  
(Verena Schlittenbauer).  
Нотариус в Розенхайме

/Подпись/  
Верена Шлиттенбауэр (Verena Schlittenbauer)  
нотариус гражданского права  
D-83022 Розенхайм (Rosenheim),  
ул. Куфштайнер (Kufsteiner Str.), 14

Перевод указанного документа с английского и немецкого языков на русский язык выполнен переводчиком Чигриновой Юлией Александровной. Перевод является правильным, точным и полным.

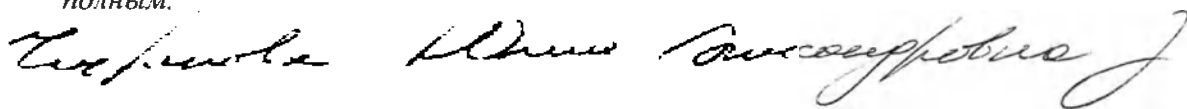

Российская Федерация

Санкт-Петербург

Пятнадцатого февраля две тысячи двадцать третьего года

Я, Кашеева Анна Юрьевна, временно исполняющая обязанности нотариуса Санкт-Петербурга Гарина Игоря Владимировича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Чигриновой Юлии Александровны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 78/63-н/78-2023-12-452.

Уплачено за совершение нотариального действия: 600 руб. 00 коп.



А.Ю.Кашеева

ВРИО нотариуса  
Кашеева  
Анна Юрьевна



Российская Федерация

Санкт-Петербург

Пятнадцатого февраля две тысячи двадцать третьего года

Я, Кащеева Анна Юрьевна, временно исполняющая обязанности нотариуса Санкт-Петербурга Гарина Игоря Владимировича, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Листы 1-53 предоставленного документа являются ксерокопией.

Зарегистрировано в реестре: № 78/63-н/78-2023-12-456.

Уплачено за совершение нотариального действия: 9630 руб. 00 коп.



А.Ю.Кащеева



**ВРИО нотариуса**  
**Кащеева**  
**Анна Юрьевна**