

**Фотографическое изображение медицинского изделия
Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»
по ТУ 22.19.71-067-85535470-2022**

1. 740 x 15 мм




2. 1000 x 15 мм




3. 1200 x 15 mm




4. 740 x 25 мм с элементами фиксации

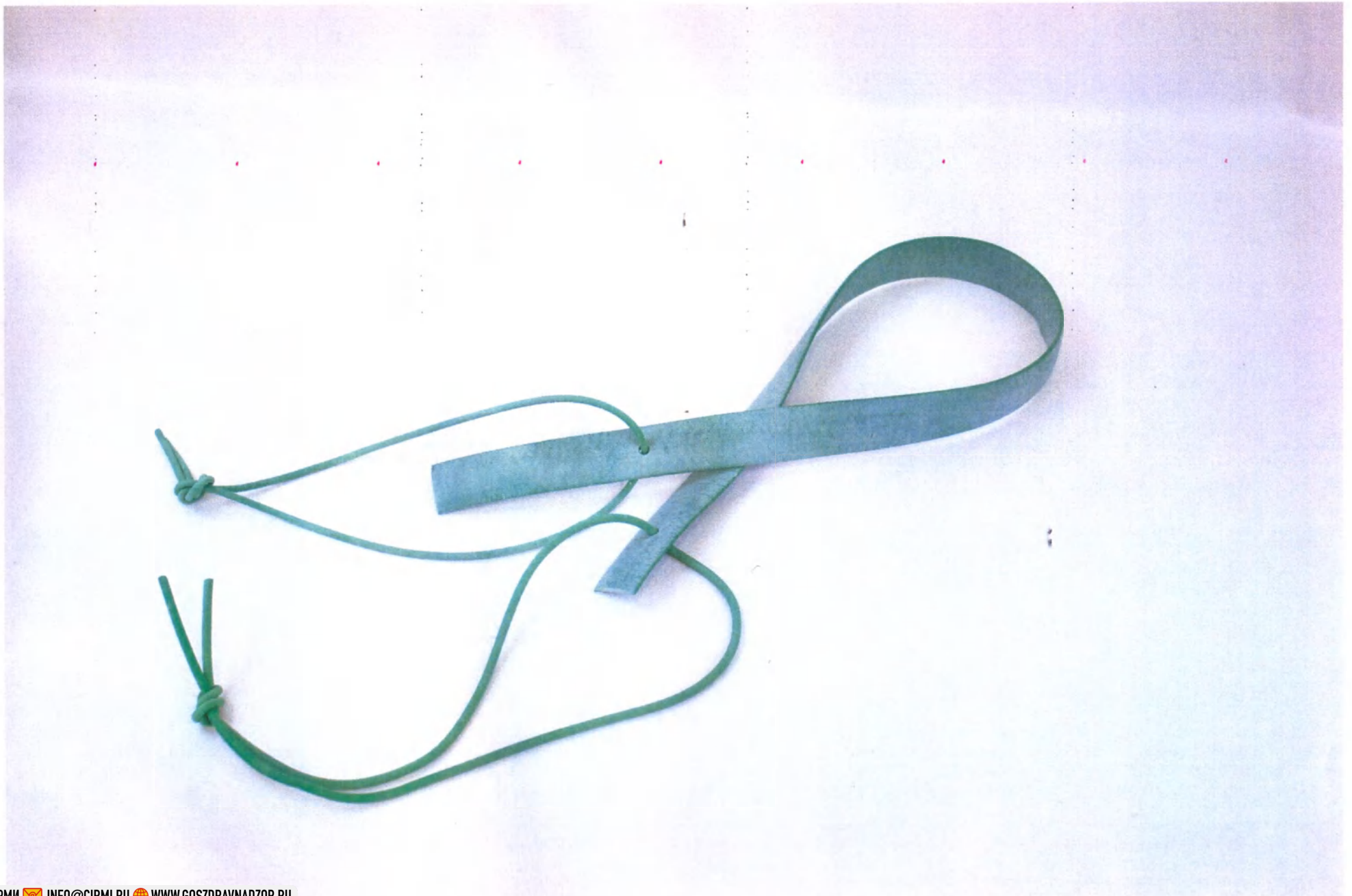

5. 1000 x 25 мм с элементами фиксации

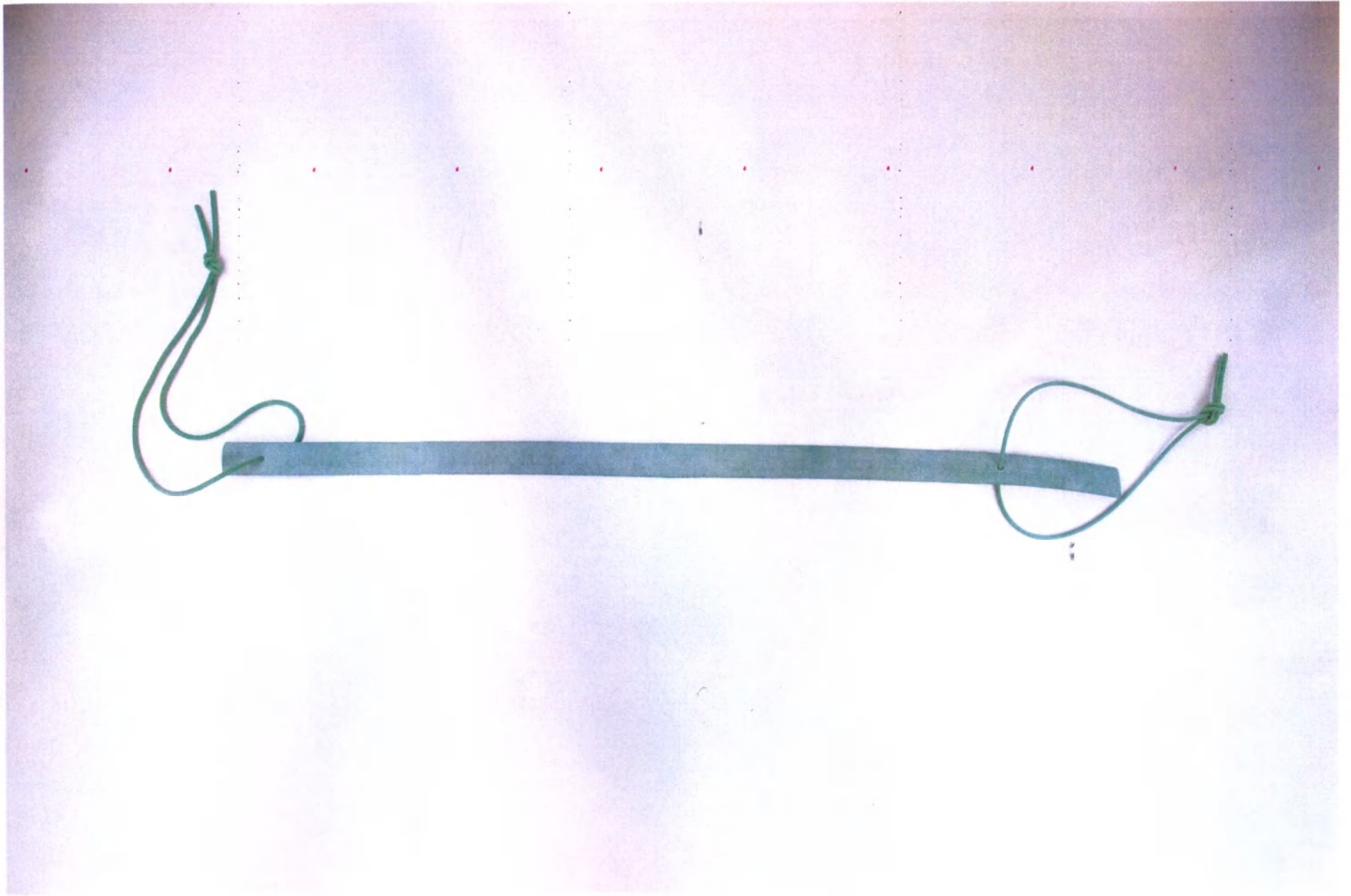

6. 1200 x 25 мм с элементами фиксации

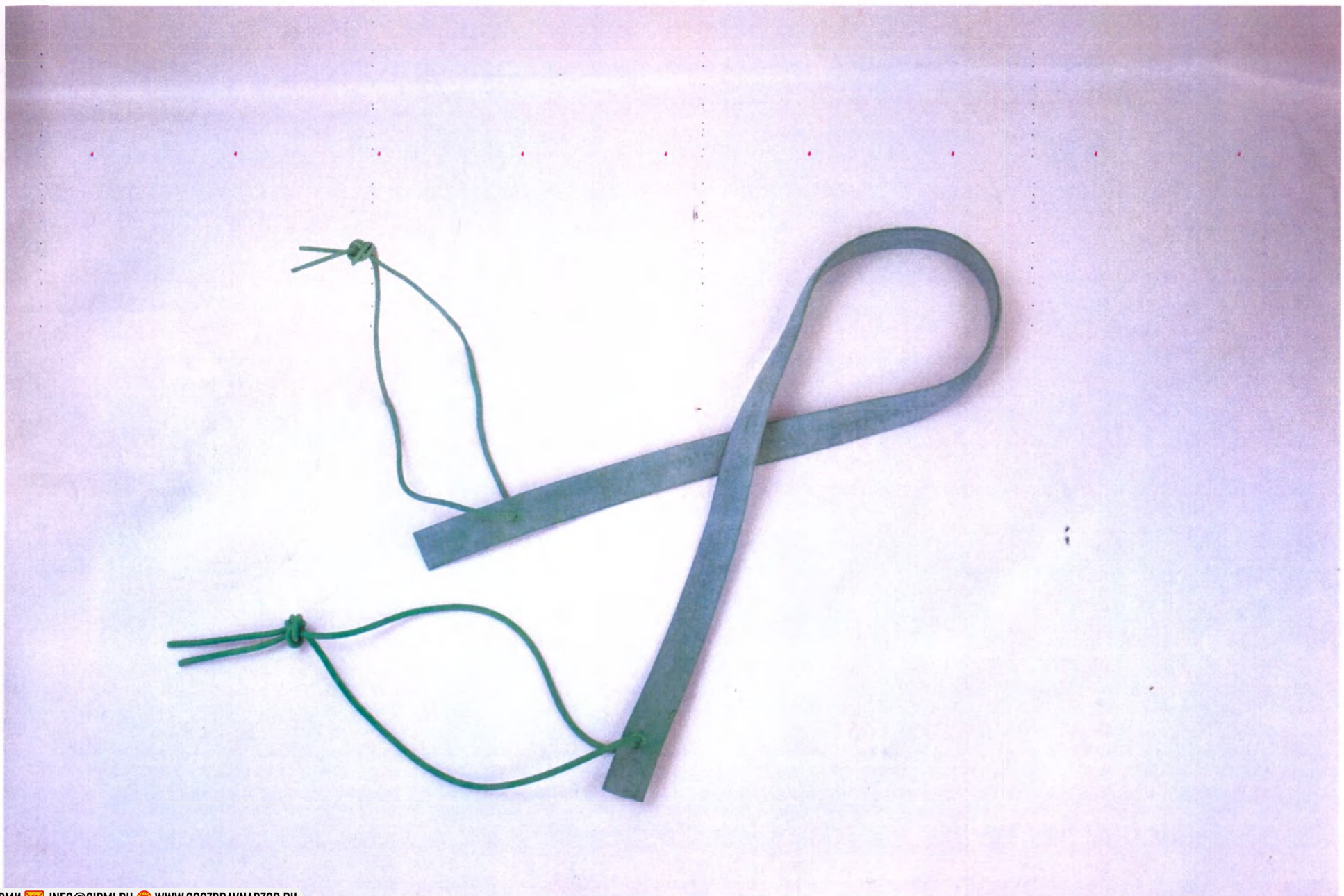

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

7 листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.





www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор



Андросов В.В.

Макеты маркировки (проект)
Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»
по ТУ 22.19.71-067-85535470-2022

Этикетка Жг-Э-01
для исполнений 1 -3 (двухсторонняя)

Жгут кровоостанавливающий резиновый
«Виталфарм» по ТУ 22.19.71-067-85535470-2022

Наименование (исполнение) изделия...

В²ИТАЛ^{фарм}

ТУ 22.19.71-067-85535470-2022 РУ № ...

Жгут предназначен для временной остановки кровотечения при повреждении магистральных сосудов конечностей человека. Многооборотный.

Использование жгута показано при ранении конечности, когда определить вид и интенсивность кровотечения из-за одежды невозможно, при ранении крупного сосуда.

Противопоказания: не использовать жгут ниже коленного и локтевого суставов.

Хранить при температуре от 0°C до + 25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Жгуты должны быть защищены от прямых солнечных лучей, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

Перед первым применением и после каждого использования продезинфицировать двукратным протиранием (интервал - 15 мин.) салфеткой из бязи или марли, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства, и просушить.

Утилизировать в ЛПУ в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21, вне медицинских учреждений как бытовые отходы.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм» Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, п.п. Сплавино, ул. Садовая д.2
т/ф: +7 (812)335-05-85, www.vitalfarm.ru

Срок годности: 3 года. **Гарантийный срок эксплуатации:** 1 год.

Дата изготовления и номер партии: см. на упаковке.

Инструкция по применению:

1. Перед наложением жгут следует завести за конечность и растянуть. Жгут накладывать поверх одежды или бинта во избежание повреждения кожи.

2. Завязать жгут на узел.

3. Указать точное время наложения жгута. Жгут должен быть хорошо заметен.

--

Основные признаки правильно наложенного жгута:

- прекращение пульсации сосудов ниже наложенного жгута;
- прекращение кровотечения из раны;
- побледнение кожи.

Сроки безопасного нахождения жгута на конечности составляют не более 1 часа. Если эвакуация занимает длительное время, жгут необходимо ослаблять на 10-15 секунд и снова затягивать, но уже не более чем на 20 – 30 минут.

**Жгут кровоостанавливающий резиновый
«Виталфарм» по ТУ 22.19.71-067-85535470-2022**

Наименование (исполнение) изделия...

В²ИТАЛФАРМ

ТУ 22.19.71-067-85535470-2022 РУ № ...

Жгут предназначен для временной остановки кровотечения при повреждении магистральных сосудов конечностей человека. Многофункциональный.

Жгут снабжен двумя петлями для обеспечения возможности фиксации жгута на конечностях любого размера. Рекомендовано: для тонких конечностей фиксировать жгут петлей, расположенной на большем расстоянии от края; для толстых - петлей, расположенной на меньшем расстоянии от края.

Использование жгута показано при ранении конечности, когда определить вид и интенсивность кровотечения из-за одежды невозможно, при ранении крупного сосуда.

Противопоказания: не использовать жгут ниже коленного и локтевого суставов.

Хранить при температуре от 0°C до + 25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Жгуты должны быть защищены от прямых солнечных лучей, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

Перед первым применением и после каждого использования продезинфицировать двукратным пропитыванием (интервал - 15 мин.) салфеткой из бязи или марли, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства, и просушить.

Утилизировать в ЛПУ в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21, вне медицинских учреждений как бытовые отходы.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм» Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, п.п. Спасскино, ул. Садовая д.2 т.ф. +7 (812)335-05-85, www.vitalfarm.ru

Срок годности: 3 года. **Гарантийный срок эксплуатации:** 1 год.

Дата изготовления и номер партии: см. на упаковке.

Инструкция по применению:

1. Перед наложением жгута следует завести за конечность и растянуть. Жгут накладывать поверх одежды или бинта во избежание повреждения кожи.

2. Натянуть петлю и завести под свободный конец жгута.

3. Указать точное время наложения жгута. Жгут должен быть хорошо заметен.



Фиксация жгута на конечности

Основные признаки правильно наложенного жгута:

- прекращение пульсации сосудов ниже наложенного жгута;
- прекращение кровотечения из раны;
- побледнение кожи.

Сроки безопасного нахождения жгута на конечности составляют не более 1 часа. Если эвакуация занимает длительное время, жгут необходимо ослаблять на 10-15 секунд и снова затягивать, но уже не более чем на 20 – 30 минут.

Потребительская упаковка Жг-У-01 для исполнений 1 -3

Многоразовый. Использование жгута показано при ранении конечности, когда определить вид и интенсивность кровотечения из-за одежды невозможно, при ранении крупного сосуда.

Противопоказания: не использовать жгут ниже коленного и локтевого суставов

Хранить при температуре от 0°C до + 25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Жгуты должны быть защищены от прямых солнечных лучей, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

Утилизировать в ЛПУ в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21, вне медицинских учреждений как бытовые отходы.

Перед первым применением и после каждого использования продезинфицировать двукратным протиранием (интервал – 15 мин.) салфеткой из бязи или марли, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства, и просушить.

Срок годности: 3 года. **Гарантийный срок эксплуатации:** 1 год.

Дата изготовления и номер партии: см. на упаковке.

ЖГУТ

кровоостанавливающий
резиновый «Виталфарм»
по ТУ 22.19.71-067-85535470-2022
Наименование (исполнение) изделия..

Предназначен для временной остановки
кровотечения при повреждении
магистральных сосудов конечностей человека.

ВИТАЛФАРМ

ТУ 22.19.71-067-85535470-2022
РУ № ..

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм» Россия,
187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2
т/ф: +7 (812)335-05-85, www.vitalfarm.ru

Инструкция по применению:

1. Перед наложением жгута следует завести за конечность и растянуть. Жгут накладывать поверх одежды или бинта во избежание повреждения кожи.
2. Завязать жгут на узел.
3. Указать точное время наложения жгута. Жгут должен быть хорошо заметен.

Основные признаки правильно наложенного жгута:

- прекращение пульсации сосудов ниже наложенного жгута;
- прекращение кровотечения из раны;
- побледнение кожи.

Сроки безопасного нахождения жгута на конечности составляют не более 1 часа. Если эвакуация занимает длительное время, жгут необходимо ослаблять на 10-15 секунд и снова затягивать, но уже не более чем на 20 – 30 минут.

штрихкод

Потребительская упаковка ЖГ-У-02
для исполнений 4 - 6 с элементами фиксации

Многоразовый Жгут снабжен двумя петлями для обеспечения возможности фиксации жгута на конечностях любого размера. **Рекомендовано:** для тонких конечностей фиксировать жгут петлей, расположенной на большем расстоянии от края, для толстых - петлей, расположенной на меньшем расстоянии от края. Использование жгута показано при ранении конечности, когда определить вид и интенсивность кровотечения из-за одежды невозможно, при ранении крупного сосуда.

Противопоказания: не использовать жгут ниже коленного и локтевого суставов.

Хранить при температуре от 0 °С до + 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Жгуты должны быть защищены от прямых солнечных лучей, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину. Утилизировать в ЛПУ в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21, вне медицинских учреждений как бытовые отходы.

Перед первым применением и после каждого использования продезинфицировать двукратным протиранием (интервал – 15 мин.) салфеткой из бязи или марли, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства, и просушить.

Срок годности: 3 года. **Гарантийный срок эксплуатации:** 1 год.

Дата изготовления и номер партии: см. на упаковке.

ЖГУТ

кровоостанавливающий
резиновый «Виталфарм»
по ТУ 22.19.71-067-85535470-2022
Наименование (исполнение) изделия..

Предназначен для временной остановки
кровотечения при повреждении
магистральных сосудов конечностей человека.

В ИТАЛ ФАРМ

ТУ 22.19.71-067-85535470-2022
РУ № ..

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм» Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2 т/ф: +7 (812)335-05-85, www.vitalfarm.ru

Инструкция по применению: 1. Перед наложением жгута следует завести за конечность и растянуть.



фиксация жгута
на конечности

Жгут накладывать поверх одежды или бинта во избежание повреждения кожи.

2. Натянуть петлю и завести под свободный конец жгута.

3. Указать точное время наложения жгута. Жгут должен быть хорошо заметен.

Признаки правильно наложенного жгута

- прекращение пульсации сосудов ниже наложенного жгута,
- прекращение кровотечения из раны,
- побледнение кожи.

Сроки безопасного нахождения жгута на конечности составляют не более 1 часа. Если эвакуация занимает длительное время, жгут необходимо ослаблять на 10-15 сек. и снова затягивать, но уже не более чем на 20 – 30 минут.

штрихкод

**Жгут кровоостанавливающий резиновый
«Виталфарм» по ТУ 22.19.71-067-85535470-2022**

Наименование (исполнение) изделия.. **В²ИТАЛ^{ФАРМ}**

ТУ 22.19.71-067-85535470-2022

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» Россия, 187322, Ленинградская обл.,

Кировский р-н, г. п. Сиявино, ул. Садовая д.2


т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

Срок годности: 3 года.

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год.

Дата изготовления/номер партии:

**Количество штук
в упаковке**

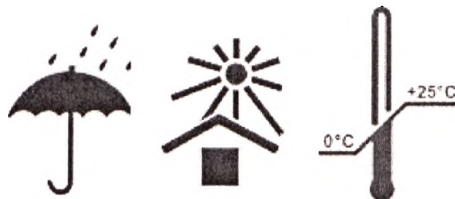

ШК

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

6 листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.

