



www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

Андросов В.В.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм» по ТУ 22.19.71-067-85535470-2022

Назначение медицинского изделия: жгут предназначен для временной остановки кровотечения при повреждении магистральных сосудов конечностей человека.

Область применения: для оказания первой помощи в стационарных, домашних и полевых условиях.

Многоразовый.

Показания:

Использование жгута показано при ранении конечности, когда определить вид и интенсивность кровотечения из-за одежды невозможно, при ранении крупного сосуда.

Противопоказания:

Не использовать жгут ниже коленного и локтевого суставов.

Риски применения: при нахождении жгута на конечности более 1 часа возможен некроз кожных покровов.

Потенциальные потребители: лица, оказывающие первую помощь.

Инструкция по применению:

1. Перед наложением жгута следует завести за конечность и растянуть. Жгут накладывать поверх одежды или бинта во избежание повреждения кожи.
2. Завязать жгут на узел (для исполнения 1-3). Натянуть петлю и завести под свободный конец жгута (для исполнений 4-6).
3. Указать точное время наложения жгута. Жгут должен быть хорошо заметен.

Основные признаки правильно наложенного жгута:

- прекращение пульсации сосудов ниже наложенного жгута;
- прекращение кровотечения из раны;
- побледнение кожи.

Сроки безопасного нахождения жгута на конечности составляют не более 1 часа. Если эвакуация занимает длительное время, жгут необходимо ослаблять на 10-15 секунд и снова затягивать, но уже не более чем на 20 – 30 минут.

Технические характеристики:

Изделие выпускается в следующих исполнениях:

1. 740 x 15 мм;
2. 1000 x 15 мм;
3. 1200 x 15 мм;
4. 740 x 25 мм с элементами фиксации;
5. 1000 x 25 мм с элементами фиксации;
6. 1200 x 25 мм с элементами фиксации.

Допуски:

По длине – ± 50 мм;

По ширине – ± 5 мм;

По толщине – $\pm 1,5$ мм.

Жгут представляет собой плоскую резиновую ленту, предназначенную для наложения на конечность пострадавшего с целью пережатия сосудов и остановки кровотечения.

Исполнения 4, 5 и 6 представляют собой резиновую ленту, в которой с противоположных концов выполнены отверстия с размещенными в них элементами фиксации в виде петли из резинового шнура, причем отверстия расположены на разном удалении от соответствующих концов ленты: не более 10 см от одного края и не более 5 см от второго края.

Рекомендовано: для тонких конечностей фиксировать жгут петлей, расположенной на большем расстоянии от края; для толстых - петлей, расположенной на меньшем расстоянии от края (*для исполнений 4-6*).

Наличие антиадгезива и незначительная шероховатость допустимо.

Условия хранения и транспортирования: Транспортирование и хранение при температуре от 0°C до + 25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Жгуты должны быть защищены от прямых солнечных лучей, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

Дезинфекция: перед первым применением и после каждого использования продезинфицировать двукратным протиранием (интервал – 15 мин.) салфеткой из бязи или марли, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства, и просушить.

Утилизация: Утилизация жгутов после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Жгуты, используемые вне медицинских учреждений, утилизировать как бытовые отходы.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7(812)335-05-85, www.vitalfarm.ru

Срок годности: 3 года.

Гарантийный срок хранения: 3 года.

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

Дата изготовления и номер партии: указываются на упаковке или этикетке.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
3 листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.

