
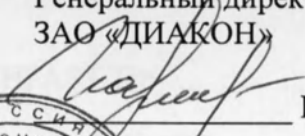


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «ДИАКОН»

 Карпова И.Е.

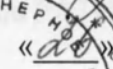

«» 2011 г.

ОКП 93 9800

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Материалов расходных
для анализатора иммунохемилюминесцентного PATHFAST
производства Mitsubishi Chemical Medience Corporation, Япония**

2011

Содержание

1. Наконечники одноразовые PATHFAST (PATHFAST Tip).....	3
2. Контейнеры для использованных наконечников PATHFAST (PATHFAST Waste Box).....	5

Введение

Наконечник PATHFAST (PATHFAST Tip) предназначен для использования в анализаторе PATHFAST. Наконечник предназначен для измерения концентрации глюкозы, а также для измерения содержания холестерина, триглицеридов, креатинина, мочевины, мочевой кислоты, билирубина, а также для измерения содержания гемоглобина в крови.

Использование наконечника PATHFAST

- Снимите с упаковки упаковку PATHFAST. Наконечник PATHFAST находится в упаковке, которая защищает его от повреждений и загрязнения. Откройте упаковку, выньте наконечник и утилизируйте упаковку.
- Вставьте наконечник в анализатор. Наконечник PATHFAST вставляется в анализатор в соответствии с инструкцией. Действуйте осторожно, чтобы избежать повреждения анализатора.
- Убедитесь в том, что наконечник правильно вставлен в анализатор.
- Закройте упаковку, чтобы избежать загрязнения.

Использование анализатора PATHFAST

- Перед использованием анализатора убедитесь, что анализатор правильно настроен.
- Не используйте анализатор, если анализатор не работает правильно.
- Замените «мембрану» анализатора, если анализатор не работает правильно.
- Не используйте анализатор, если анализатор не работает правильно.

Утилизация использованных наконечников

- При утилизации наконечников PATHFAST используйте контейнер PATHFAST Waste Box. После анализа утилизируйте наконечник PATHFAST в контейнере PATHFAST Waste Box.
- Не утилизируйте наконечники PATHFAST в мусорный бак.

Использование анализатора PATHFAST при работе

Общие указания

- Наконечники PATHFAST предназначены для работы с анализатором PATHFAST. Не используйте наконечники PATHFAST для других целей.
- При работе с анализатором PATHFAST используйте перчатки.

Использование анализатора PATHFAST при работе с образцами

- Перед использованием анализатора PATHFAST убедитесь, что анализатор правильно настроен.
- Не используйте анализатор, если анализатор не работает правильно.

Для использования в диагностике in vitro.

1. Наконечники одноразовые PATHFAST (PATHFAST Tip).

Кат. № 300936.

Описание

Наконечник одноразовый полипропиленовый объёмом 1 мл с полиэтиленовым фильтром, предназначенным для предотвращения переносного загрязнения жидкостей.

Наконечник одноразовый PATHFAST требует квалифицированного обращения, поскольку часть процедуры анализа пробы проводится в самом наконечнике.

Назначение

Наконечник одноразовый PATHFAST разработан исключительно для применения с анализатором PATHFAST. Наконечник предназначен для всасывания и распределения жидкостей, а также для разделения связанных и несвязанных антител при помощи магнитного устройства, удерживающего магнитные частицы на внутренних стенках наконечника.

Установка одноразовых наконечников (наконечников PATHFAST)

- Снимите с упаковки упаковочную плёнку. Извлеките новые наконечники из упаковки и вставьте их в ячейки держателя для наконечников напротив установленных реагентных картриджей.
- Вынимая наконечники из коробки, держите их за основание, не касаясь рабочего конца. Действуйте осторожно, чтобы избежать загрязнения или повреждения концов наконечников.
- Убедитесь в том, что наконечники вставлены в держатель правильно.
- Закройте переднюю крышку анализатора до упора.

Извлечение использованных наконечников

- Сброс использованных наконечников в специальный контейнер производится автоматически.
- Извлеките контейнер для использованных наконечников из прибора вручную и выбросьте использованные наконечники. Установите контейнер обратно в прибор.
- Заменяйте контейнер для использованных наконечников на новый после каждых 20 пакетов анализов, либо один раз в неделю.

Утилизация после анализа

- При утилизации наконечников следуйте соответствующим нормативам. После анализа выньте использованные наконечники из контейнера и утилизируйте их как инфекционные отходы, аналогично процедуре утилизации проб.
- Не использовать наконечники повторно.

Меры предосторожности при обращении

Общие указания

- Наконечники предназначены только для работы на анализаторе PATHFAST. Не использовать наконечники для иных целей.
- При работе следует использовать маску и резиновые перчатки.

Меры предосторожности при открытии упаковки и хранении

- Перед использованием убедитесь в том, что наконечники не имеют какой-либо деформации. Не используйте погнутые, деформированные или выцветшие наконечники.

- Не используйте наконечники, упавшие на пол и т.п.
- Сразу же после извлечения необходимого количества наконечников, плотно закройте крышку коробки. При хранении коробку с наконечниками следует ставить крышкой вверх.

Упаковка

По 42 шт. в упаковку вместе с инструкцией по применению, в фасовке по 5 x 42 шт. в картонную коробку.

Условия и срок хранения

Хранить при температуре от +4° до +40°С.

Срок хранения не ограничен при условии соблюдения условий хранения.

Производитель:

«Мицубиси Кемикал Медиенс Корпорейшн», Япония,
Mitsubishi Chemical Medience Corporation
2-8, Shibaura 4-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8559, Japan,
Tel: + 81-3-6722-4170; Fax: +81-3-6722-4171,
www.medience.co.jp/english

Для использования в диагностике in vitro

2. Контейнеры для использованных наконечников PATHFAST (PATHFAST Waste Box).

Кат. № 300950

Описание

Контейнеры полипропиленовые, цвет белый, размеры 122 x 22 x 89 мм.

Назначение

Контейнеры для использованных наконечников PATHFAST предназначены для сбора использованных наконечников PATHFAST, которые автоматически сбрасываются в контейнер в конце каждого цикла анализов.

Установка и извлечение контейнера для использованных наконечников

- Сброс использованных наконечников в специальный контейнер производится автоматически.
- Перед подготовкой проб и реагентов проверьте, не содержатся ли в контейнере использованные наконечники.
- Если необходимо, извлеките контейнер из прибора вручную, опорожните его и выбросьте использованные наконечники. Установите контейнер на место.
- Контейнер имеет ограниченный срок использования. Контейнер необходимо заменять новым через каждые 20 циклов анализов, либо один раз в неделю.

Меры предосторожности при использовании

Общие указания

- При работе следует использовать маску и резиновые перчатки.

Утилизация после анализа

- При утилизации контейнеров следуйте соответствующим нормативам. Утилизировать как инфекционные отходы, аналогично процедуре утилизации проб.

Упаковка

По 10 шт. в картонную упаковку.

Условия и срок хранения

Не требуют специальных условий хранения.

Срок хранения не ограничен.

Производитель:

«Мицубиси Кемикал Медиенс Корпорейшн», Япония,
Mitsubishi Chemical Medience Corporation
2-8, Shibaura 4-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8559, Japan,
Tel: + 81-3-6722-4170; Fax: +81-3-6722-4171,
www.medience.co.jp/english

5 (пять) ЛИСТОВ

И. Е. Карпова

