

ИНСТРУКЦИЯ

по применению эндотрахеальных трубок.

1. Назначение

Эндотрахеальные трубки предназначены для кратковременной или временной, оральной или назальной интубации

2. Основные технические характеристики

2.1. Эндотрахеальная трубка изготовлена из прозрачного, имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида

2.2. Трубка имеет следующие размеры и длину:

По шкале Шарьера Ch/Fr	Внутренний диаметр I. D. (мм)	Внешний диаметр I. D. (мм)	Длина (мм)
Трубки с манжетой			
12	3,0	4,0	160
14	3,5	4,7	185
16	4,0	5,3	210
18	4,5	6,0	225
20	5,0	6,7	245
22	5,5	7,3	270
24	6,0	8,0	280
26	6,5	8,7	295
28	7,0	9,3	300
30	7,5	10,0	310
32	8,0	10,7	325
34	8,5	11,3	325
36	9,0	12	325
38	9,5	12,7	325
Трубки без манжеты			
8	2,0	2,7	140
10	2,5	3,3	140
12	3,0	4,0	160
14	3,5	4,7	185
16	4,0	5,3	210
18	4,5	6,0	225

2.3. Дистальный конец трубки закругленной формы, гладкий, имеет окошко «Мерфи»

2.4. Просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах

2.5. У трубок с манжетой – манжета большого объема малого давления (32 мм водного столба)

3. Подготовка и порядок работы изделия:

- проверить целостность стерильной индивидуальной упаковки
- перед введением эндотрахеальной трубки проверить, чтобы манжета находилась в не раздутом состоянии
- проверить надежность фиксации коннектора в трубке
- эндотрахеальную трубку проводят через раскрытую голосовую щель по ларингоскопу или иному вспомогательному устройству в трахею
- манжетка должна располагаться в верхних отделах трахеи

надуть воздухом манжету с помощью шприца через пилотный баллон
- закрепить эндотрахеальную трубку в нужном положении (специальный набор для фиксации эндотрахеальной трубки)
- по окончании интубации с помощью шприца из манжеты через пилотный баллон убрать воздух и вынуть трубку;

ВНИМАНИЕ !

- Напряжение пилотного баллона не является критерием наполнения манжеты необходимым объемом воздуха.
- Положение эндотрахеальной трубки в трахее контролируется при аускультации легких (дыхательные шумы выслушиваются в легких);

Правила хранения и использования

1. Изделия должны храниться при температуре от - 30 до +45 °С и относительной влажности от 30% до 85 %, в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей и влаги.
2. Перед применением изделия необходимо убедиться в целостности стерильной упаковки. Не применять при нарушенной упаковке и истечении срока годности.
3. Трубка является изделием однократного применения и подлежит утилизации после применения.

Коммерческий директор
ООО «МЕДИКОМ»



С. Н. Савосько

ИНСТРУКЦИЯ по применению трахеостомической трубки.

Назначение

Трахеостомические трубки предназначены для интубации трахеи через трахеостому

Основные технические характеристики

1. Трахеостомическая трубка изготовлена из прозрачного, имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида

2. Трубка имеет следующие размеры и длину:

Шкала Шарьера Ch/Fr	Внутренний диаметр I. D. (мм)	Внешний диаметр I. D. (мм)	Длина (мм)
Трубки без манжет			
12	3,0	4,0	30
14	3,5	4,7	40
16	4,0	5,3	40
18	4,5	6,0	40
Трубки с манжетой			
20	5,0	6,7	55
22	5,5	7,3	55
24	6,0	8,0	60
26	6,5	8,7	70
28	7,0	9,3	75
30	7,5	10,0	80
32	8,0	10,7	85
34	8,5	11,3	90
36	9,0	12,0	90

3. Несмываемая маркировка на трубке и пилотном баллоне

4. Имеет гибкий фланец и шейную ленту для крепления на шею пациента

5. Наличие стилета для придания необходимой степени жесткости

1. Подготовка и порядок работы изделия:

- проверить целостность стерильной индивидуальной упаковки
- перед введением трахеостомической трубки проверить, чтобы манжета находилась в не раздутом состоянии
- проверить надежность фиксации стилета и коннектора в трубке
- трахеостомическая трубка вводится через трахеостомическое отверстие, наложенное по общепринятым медицинским методикам с помощью стилета с учетом анатомического изгиба
- извлечь стилет
- раздуть воздухом манжету с помощью шприца через пилотный баллон
- закрепить трахеостомическую трубку в нужном положении, используя гибкий фланец коннектора и ленты для фиксации
- по окончании интубации с помощью шприца из манжеты через пилотный баллон убрать воздух и вынуть трубку

ВНИМАНИЕ !

- Напряжение пилотного баллона не является критерием наполнения манжеты необходимым объемом воздуха.

- Рекомендуемый объем воздуха, вводимый в полость манжеты не должен превышать 20-25 см.куб., что будет соответствовать 27-33 см. водного столба.
- Положение трахеостомической трубки в трахее контролируется при аускультации легких (дыхательные шумы выслушиваются в легких).

Правила хранения и использования

1. Изделия должны храниться при температуре от - 30 до +45 °С и относительной влажности от 30% до 85 %, в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей и влаги.
2. Перед применением изделия необходимо убедиться в целостности стерильной упаковки. Не применять при нарушенной упаковке и истечении срока годности.
3. Трубка является изделием однократного применения и подлежит утилизации после применения.

Коммерческий директор
ООО «МЕДИКОМ»



С. Н. Савосько

Город Москва



Обществ
зарегистр
инспекцией Ф
ОГРН №1057
Красносельски
Светланы Ник
2008 г. и дове
Юрия Владим
Читы 20.02.20
- представ
органами, ос
(изделий ме
организацион
связанную с
медицинской
- проведе
- подачу д
- внесени
дополнительн
- подписа
документаци
- оплату у
- получе
удостоверени

Доверен
передоверия.

Подпис

Коммерчески
ООО «Медик