



www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор



Андросов В.В.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Пакет гипотермический «Виталфарм»**  
**по ТУ 32.50.13-049-85535470-2019, в вариантах исполнения:**

**Пакет гипотермический «Виталфарм» Тип 1,**  
**Пакет гипотермический «Виталфарм» Тип 2,**  
**Пакет гипотермический «Виталфарм» Тип 3,**  
**Пакет гипотермический «Виталфарм» Тип 4,**

**производства ЗАО «Виталфарм»**

**Назначение медицинского изделия:** Изделие предназначено для местного охлаждения и/или обезболивания.

Изделие однократного применения.

Время эффективного применения: не менее 10 минут.

**Область применения медицинского изделия:** для оказания первой само и взаимопомощи.

**Показания:** при травмах (переломах, ушибах, растяжении связок, вывихах), при тепловом или солнечном ударе, при ожогах (без повреждения кожных покровов), при несильных капиллярных или носовых кровотечениях, при подозрении на повреждения внутренних органов, при укусах насекомых.

**Потенциальные потребители:** круг потребителей не ограничен.

**Применение:** Расположить изделие на ровной поверхности. Раздавить внутренний пакет с водой. Встряхнуть для лучшего смешивания компонентов. Приложить к пострадавшему месту.

При использовании на лице или поврежденной коже обернуть дополнительно полиэтиленовой пленкой.

**Риски применения и меры предосторожности:**

При повреждении внешнего пакета изделие не использовать!

Беречь от детей! Не глотать!

Избегать попадания на кожу и слизистые! При попадании содержимого пакета на кожу или в глаза, промыть обильно водой.

В случае проглатывания содержимого пакета, выпить большое количество воды, принять активированный уголь, при необходимости обратиться за врачебной помощью (показать врачу пакет).

Противопоказания отсутствуют.

**Комплектность:**

Пакет гипотермический «Виталфарм» – 1 шт.

Этикетка – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Допускается отсутствие этикетки и/или инструкции по применению, в случае нанесения маркировки на потребительскую упаковку (наружный пакет).

**Характеристики:****Конструкция изделия:**

Изделие состоит из наружного и внутреннего пакетов, в состав наружного входит аммиачная селитра, внутреннего – вода из центрального источника водоснабжения.

**Габаритные размеры пакета гипотермического:**

Тип 1, 2:    высота, мм –  $140 \pm 15$ ,  
                  ширина, мм –  $117 \pm 13$ .

Тип 3, 4:    высота, мм –  $160 \pm 30$ ,  
                  ширина, мм –  $120 \pm 25$ .

**Масса, г:**

Тип 1 -  $40 \pm 13$ ; Тип 2 –  $50 \pm 14$ ;

Тип 3 -  $150 \pm 30$ ; Тип 4 –  $180 \pm 35$ .

Состав: селитра аммиачная, вода.

**Условия эксплуатации:**

Условия эксплуатации УХЛ 1.1 по ГОСТ 15150.

**Условия хранения:** Хранить при температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  при относительной влажности воздуха не выше 70%.

**Утилизация:** Утилизировать как отходы класса А в соответствии СанПиН 2.1.3684-21.

Не подлежит обязательной сертификации.

**Срок годности:** 3 года.

**Гарантийный срок хранения:** 3 года.

**Дата изготовления и номер партии:**

Указываются на упаковке или этикетке.

**Производитель/уполномоченная организация:**

ЗАО «Виталфарм» Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812)335-05-85, [www.vitalfarm.ru](http://www.vitalfarm.ru)

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью

3 листа (ов)

Генеральный директор  
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.

19.04.2023

