

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

«ВАЛЕРИЯ»

140415, г. Коломна, Московской области

ул. Левшина, д. 25.

тел. 1 2-52-83, т\ факс 1 2-59-41

от 13.11.14 № 45
на № _____ от _____

Руководство
по эксплуатации медицинского изделия:
Бандаж ортопедический на верхнюю конечность БНЗ-822
по ТУ 9396-006-11721429-2012

Бандаж ортопедический на верхнюю конечность БНЗ-822, предназначен для использования после мастэктомии, с целью создания 1-2 степени компрессии на отёчную руку и для улучшения лимфотоксического оттока. Изделие применяется по назначению медицинского специалиста. Бандаж изготавливается восьми размеров (00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07) в двух исполнениях – правом (П) и левом (Л), двух классов компрессии (I или II). Размер бандажа подбирается по таблице измерений.

Наименование мест измерений	размер								Предельное отклонение от номинального размера, см +/-
	00	01	02	03	04	05	06	07	
Обхват плеча, см.	24,1	25,8	27,2	30,2	31,4	34,3	36,2	38	0,5
Обхват запястья, см.	15,0	15,4	15,7	16,3	16,5	17,3	18,0	18,2	0,5
Длина рукава под проймой, см.	51,0								0,5

В послеоперационный период бандаж рекомендуется носить круглосуточно, снимать его только максимум на 30 минут, во время принятия ванны или смазывания кожи кремом.

Надевать бандаж следует аккуратно, расправляя его, не тянуть за крепление или имеющиеся швы.

Бандаж следует стирать раз в неделю в мыльном растворе нейтральных моющих средств, не содержащих отбеливающих и придающих мягкость белью компонентов. Рекомендуется ручная стирка без трения и выкручивания при температуре 40 °С.

После тщательного ополаскивания бандаж следует промокнуть полотенцами и разложить для сушки на ровной горизонтальной поверхности.

Бандаж не следует сушить вблизи открытого огня, отопительных приборов, под воздействием солнечных лучей. Запрещается гладить бандаж, подвергать химической чистке, сушить на батарее (нагревательной поверхности). Запрещается контакт бандажа с растворителями, щелочами, красящими веществами

Хранить бандаж следует при комнатной температуре, защищая от жары и влаги.

Утилизация бандажа в медицинских организациях осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790, в домашних условиях – с твердыми бытовыми отходами.

Гарантийный срок эксплуатации при правильном применении и уходе – 40 дней со дня продажи (передачи) бандажа потребителю, но не более 8 месяцев со дня изготовления.

Транспортирование бандажей должно проводиться только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах и т.д.) в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, при условиях хранения, установленных в ТУ 9396-006-11721429-2012, или при условиях хранения 2 по ГОСТ 15150.

Транспортирование на самолётах допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках.

Генеральный директор



И.Л. Епилина

Пронумеровано и прошнуровано 2 листа

Генеральный директор ОАО «Валерия»

Епилина И.Л.

