


Система-магистраль для соединения полимерных контейнеров и стеклянных бутылок
однократного применения, стерильная «Синтез» по ТУ 9398-076-00480201-2015

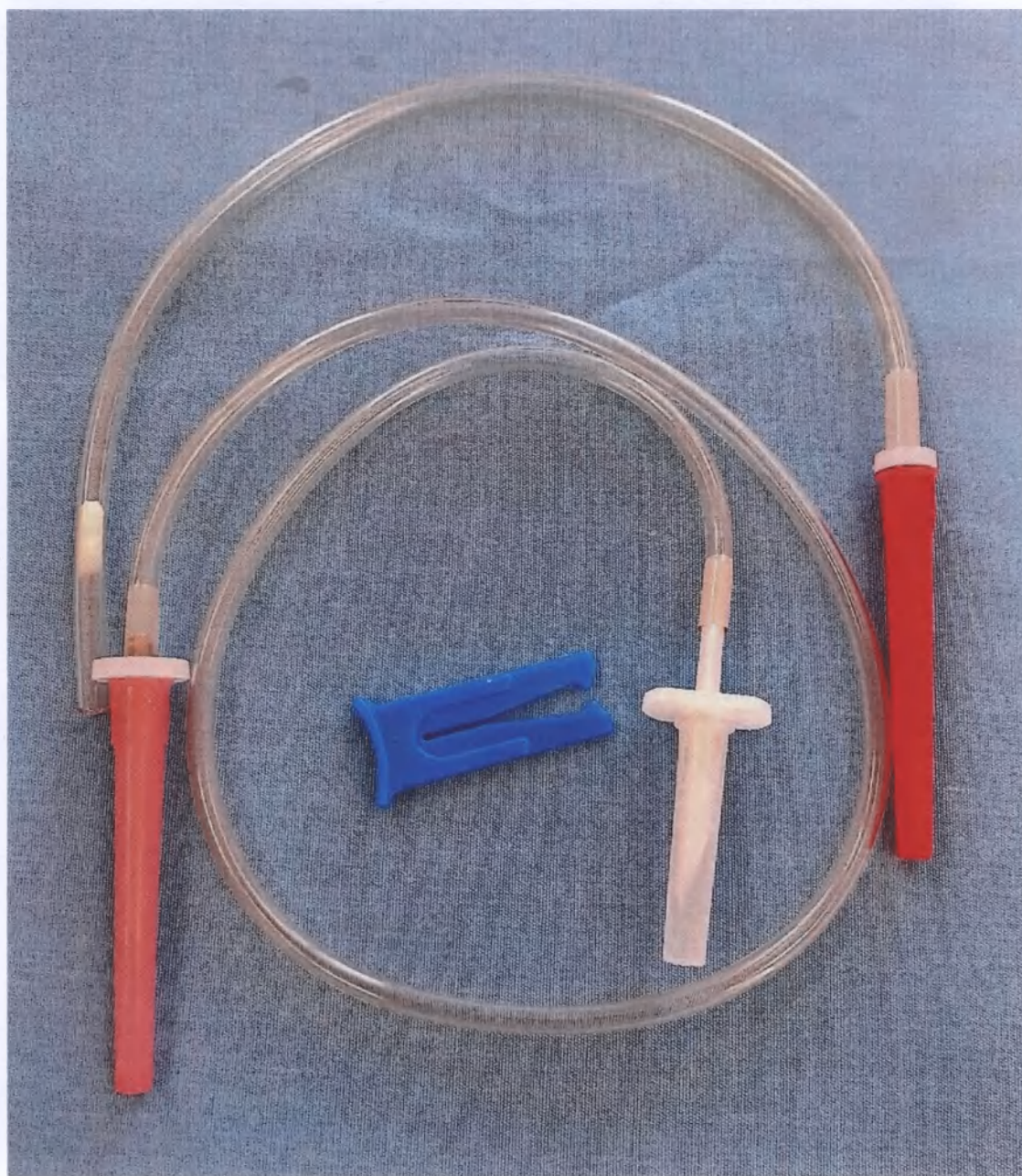




ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл.,
г. Курган, проспект Конституции, д. 7.
Тел.: 8-800-600-60-60

СИСТЕМА-МАГИСТРАЛЬ
для соединения полимерных контейнеров и
стеклянных бутылок однократного
применения, стерильная «Синтез»
по ТУ 9398-076-00480201-2015

Место для регистрационного номера и даты регистрации

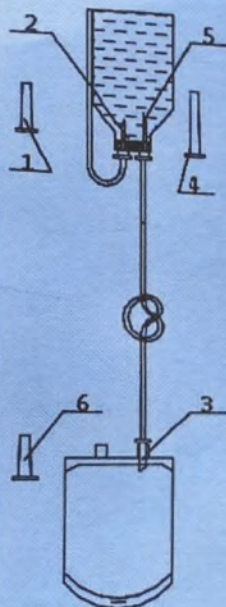

STERILE R

Способ применения

- 1 Проверьте целостность потребительской тары (пакета) и срок годности.
- 2 Обработайте пробку бутылки спиртом, йодом или другим антисептиком.
- 3 Вскройте потребительскую тару.
- 4 Сделайте петлю на трубке на расстоянии около 15 см от полимерной иглы 3.
- 5 Снимите колпачок 1 с иглы 2 воздуховода. Введите иглу 2 в пробку бутылки, при переводе содержимого из бутылки закрепите воздуховод вдоль бутылки так, чтобы его конец был на уровне дна.
- 6 Снимите колпачок 4 с металлической иглы 5 системы. Введите иглу в пробку бутылки.
- 7 Вскройте штуцер контейнера. Снимите колпачок 6 с полимерной иглы 3 и введите ее в штуцер.
- Внимание! Для исключения нарушения герметичности при введении полимерной иглы в штуцер контейнера держать иглу за ребра для захвата, не брать за трубку и хвостовик иглы!
- 8 Закрепите контейнер или бутылку на штативе.
- 9 После окончания переливания:
а) затяните петлю на системе;
б) выньте иглы из пробки;
в) сделайте второй узел на системе.

Полимерную иглу из штуцера контейнера не извлекать!

Стерильно внутри Апирогенно Нетоксично
Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах
на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов,
в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

10421 до 0524



	Система-магистраль для соединения полимерных контейнеров и стеклянных бутылок одноразового применения, стерильная «Синтез» по ЕУ 9198-075-00480201-2015 (Место для регистрационного номера и даты)		ОАО «СИНТЕЗ» Россия, 640008 Курганская обл. г. Курган проспект Конституции, д. 7 Тел.: 8-800-602-00-88
	Партия № 10421 Годен до 0524 Количество изделий 300 шт. Упаковка 1	Масса брутто В ± 1 кг Ящик № 1 ОКК	

Система и комплектный тарный материал подлежит хранению в соответствии с требованиями ГОСТ 18150 при температуре от 1 до 40 °C на складах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и источников повышенной влажности и загрязнения. После транспортировки и хранения препаративный материал должен в транспортной таре быть выдержан в герметичной упаковке в течение не менее 24 ч.

ОАО «СИНТЕЗ»
640008, Россия, г. Курган,
пр. Конституции, д. 7
тел./факс (3522) 48-16-89



Технический директор

Е.В. Дерябин

Верно:

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
(3) листов

Технический
директор



В. В. Дербябин

Система-магистраль для соединения полимерных контейнеров и стеклянных бутылок однократного применения, стерильная «Синтез»
по ТУ 9398-076-00480201-2015

Потребительская тара




ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл.,
г. Курган, проспект Конституции, д. 7.
Тел.: 8-800-600-00-80

СИСТЕМА-МАГИСТРАЛЬ
для соединения полимерных контейнеров и
стеклянных бутылок однократного
применения, стерильная «Синтез»

по ТУ 9398-076-00480201-2015

Место для регистрационного номера и даты регистрации

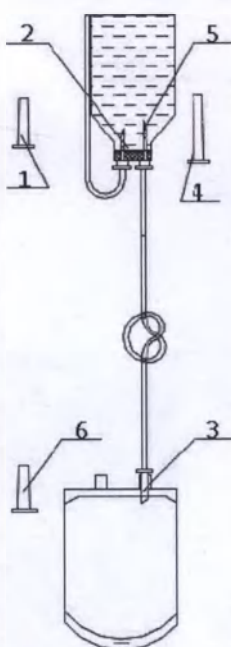

STERILE R

Способ применения

- 1 Проверьте целостность потребительской тары (пакета) и срок годности.
 - 2 Обработайте пробку бутылки спиртом, йодом или другим антисептиком.
Примечание - Используйте бутылки с резиновой уплотнительной пробкой.
 - 3 Вскройте потребительскую тару.
 - 4 Сделайте петлю на трубке на расстоянии около 15 см от полимерной иглы 3.
 - 5 Снимите колпачок 1 с иглы 2 воздуховода. Введите иглу 2 в пробку бутылки, при переводе содержимого из бутылки закрепите воздуховод вдоль бутылки так, чтобы его конец был на уровне дна.
 - 6 Снимите колпачок 4 с металлической иглы 5 системы. Введите иглу пробку бутылки.
 - 7 Вскройте штуцер контейнера. Снимите колпачок 6 с полимерной иглы 3 и введите ее в штуцер.
- Внимание! Для исключения нарушения герметичности при введении полимерной иглы в штуцер контейнера держать иглу за ребра для захвата, не брать за трубку и хвостовик иглы!**
- 8 Закрепите контейнер или бутылку на штативе.
 - 9 После окончания перегивания:
 - а) затяните петлю на системе;
 - б) выньте иглы из пробки;
 - в) сделайте второй узел на системе.

Полимерную иглу из штуцера контейнера не извлекать!

Стерильно внутри

Апирогенно

Нетоксично

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Макеты транспортной маркировки

Упаковочный лист



ОАО «Синтез», Россия, 640008
Курганская обл., г. Курган
проспект Конституции, д. 7
Тел.: 8-800-600-00-80

Система-магистраль для соединения полимерных контейнеров и стеклянных бутылок однократного применения, стерильная «Синтез»

ТУ 9398-076-00480201-2015

Партия №

Упаковщик

Годен до

Количество изделий 300 шт.

После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

Системы в транспортной таре должны храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150, при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред

Ярлык на ящик

	Система-магистраль для соединения полимерных контейнеров и стеклянных бутылок однократного применения, стерильная «Синтез»	ОАО «Синтез» Россия, 640008 Курганская обл. г. Курган проспект Конституции, д. 7 Тел.: 8-800-600-00-08
	по ТУ 9398-076-00480201-2015 Место для регистрационного номера и даты STERILE R Партия № Годен до Количество изделий 300 шт. Упаковщик Масса брутто 8 ± 1 кг Ящик № ОКК	
Системы в транспортной таре должны храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150, при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.		

Технический директор



Е.В. Дерябин

Верно:

Технический
директор

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
(2) листов




Система-магистраль для соединения полимерных контейнеров и стеклянных бутылок однократного применения, стерильная «Синтез» по ТУ 9398-076-00480201-2015

Потребительская тара

Исполнение 1




Исполнение 2

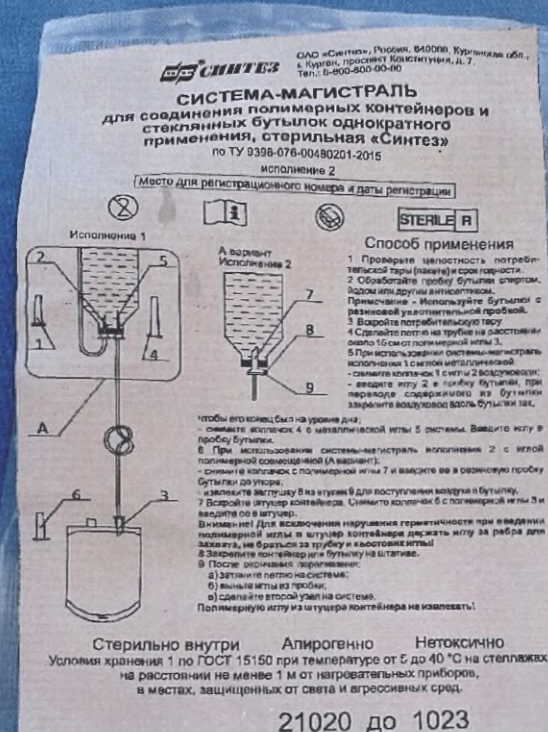


**Система-магистраль для соединения полимерных контейнеров и стеклянных бутылок однократного применения, стерильная
«Синтез» по ТУ 9398-076-00480201-2015**

Исполнение 1

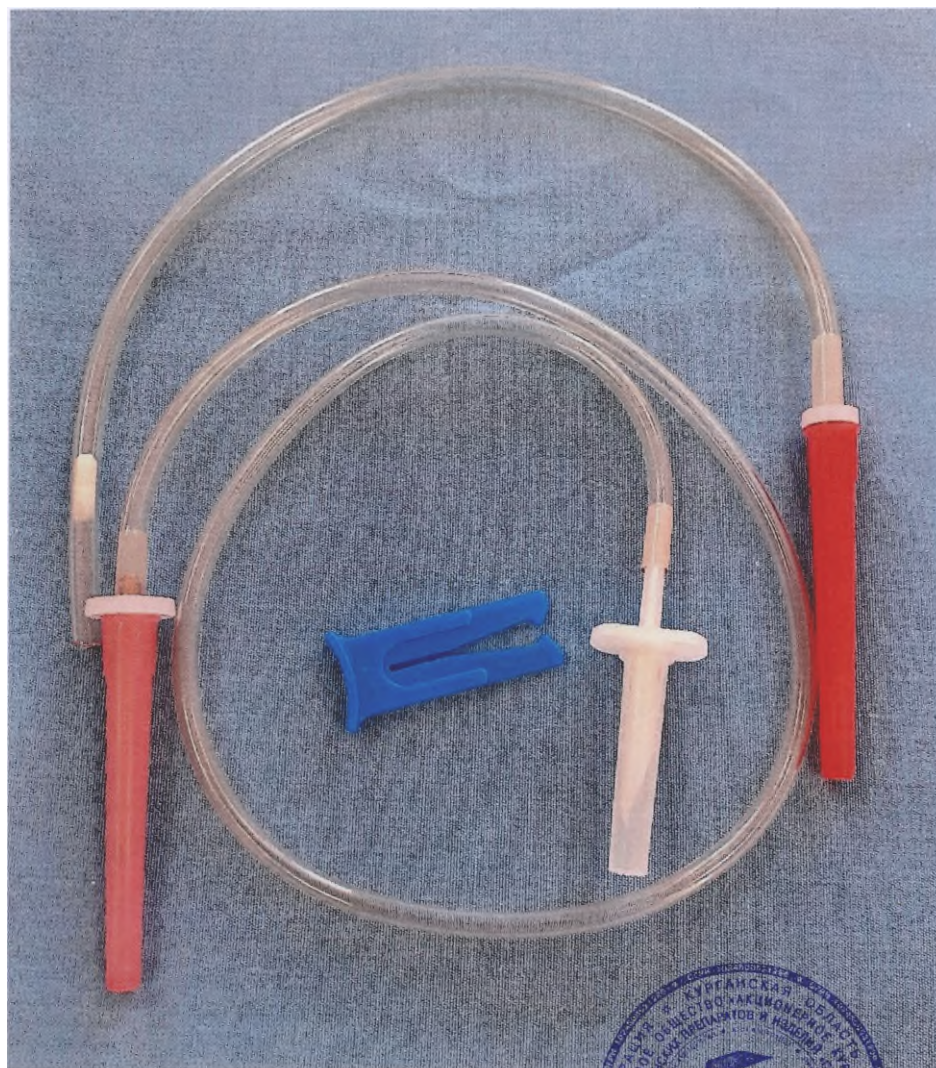

Исполнение 2

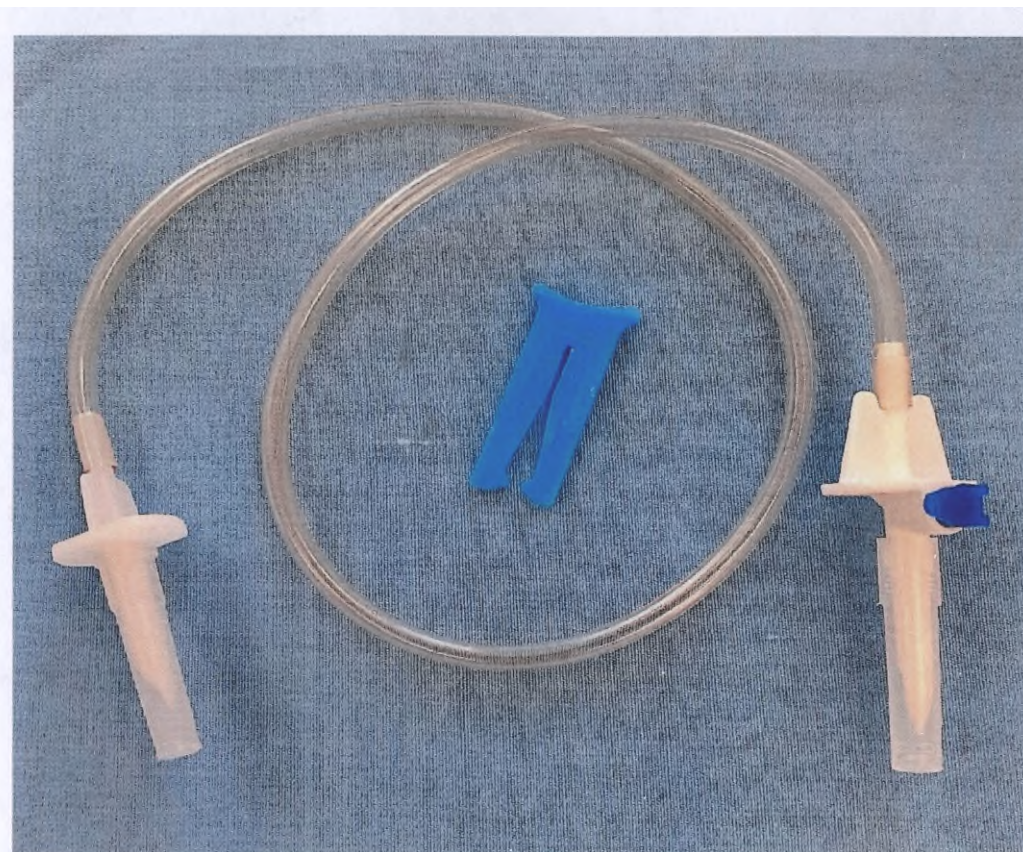

Технический директор



Reef-

Е.В. Дерябин

Система-магистраль для соединения полимерных контейнеров и стеклянных бутылок
однократного применения, стерильная «Синтез» по ТУ 9398-076-00480201-2015

Транспортная тара

Исполнение 1



Исполнение 2



Технический директор

Е.В. Дерябин

Система-магистраль для соединения полимерных контейнеров и стеклянных бутылок однократного применения, стерильная «Синтез»
по ТУ 9398-076-00480201-2015
Потребительская тара

Исполнение 1

СИТЕЗ ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

СИСТЕМА-МАГИСТРАЛЬ
для соединения полимерных контейнеров и стеклянных бутылок однократного применения, стерильная «Синтез»
по ТУ 9398-076-00480201-2015
исполнение 1

Место для регистрационного номера и даты регистрации

Исполнение 1

А вариант Исполнение 2

Способ применения

- 1 Проверьте целостность потребительской тары (пакета) и срок годности.
- 2 Обработайте пробку бутылки спиртом, йодом или другим антисептиком.
- 3 Вскройте потребительскую тару.
- 4 Сделайте петлю на трубке на расстоянии около 15 см от полимерной иглы 3.
- 5 При использовании системы-магистраль исполнения 1 с иглой металлической:
 - снимите колпачок 1 с иглы 2 воздуха;
 - введите иглу 2 в пробку бутылки, при переводе содержимого из бутылки закрепите воздух вдоль бутылки так, чтобы его конец был на уровне дна;
- 6 При использовании системы-магистраль исполнения 2 с иглой полимерной совмещенной (А вариант):
 - снимите колпачок с полимерной иглы 7 и введите ее в резиновую пробку бутылки до упора;
 - извлеките заглушку 8 из втулки 9 для поступления воздуха в бутылку.
- 7 Вскройте штуцер контейнера. Снимите колпачок 6 с полимерной иглы 3 и введите ее в штуцер.
- 8 Закрепите контейнер или бутылку на штативе.
- 9 После окончания переливания:
 - а) затяните петлю на системе;
 - б) выньте иглы из пробки;
 - в) сделайте второй узел на системе.

Внимание! Для исключения нарушения герметичности при введении полимерной иглы в штуцер контейнера держать иглу за ребра для захвата, не брать за трубку и хвостовик иглы!

Полномерную иглу из штуцера контейнера не извлекать!

Стерильно внутри Апиогенно Нетоксично
Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред

Исполнение 2

СИТЕЗ ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

СИСТЕМА-МАГИСТРАЛЬ
для соединения полимерных контейнеров и стеклянных бутылок однократного применения, стерильная «Синтез»
по ТУ 9398-076-00480201-2015
исполнение 2

Место для регистрационного номера и даты регистрации

Исполнение 1

А вариант Исполнение 2

Способ применения

- 1 Проверьте целостность потребительской тары (пакета) и срок годности.
- 2 Обработайте пробку бутылки спиртом, йодом или другим антисептиком.
- 3 Вскройте потребительскую тару.
- 4 Сделайте петлю на трубке на расстоянии около 15 см от полимерной иглы 3.
- 5 При использовании системы-магистраль исполнения 1 с иглой металлической:
 - снимите колпачок 1 с иглы 2 воздуха;
 - введите иглу 2 в пробку бутылки, при переводе содержимого из бутылки закрепите воздух вдоль бутылки так, чтобы его конец был на уровне дна;
- 6 При использовании системы-магистраль исполнения 2 с иглой полимерной совмещенной (А вариант):
 - снимите колпачок с полимерной иглы 7 и введите ее в резиновую пробку бутылки до упора;
 - извлеките заглушку 8 из втулки 9 для поступления воздуха в бутылку.
- 7 Вскройте штуцер контейнера. Снимите колпачок 6 с полимерной иглы 3 и введите ее в штуцер.
- 8 Закрепите контейнер или бутылку на штативе.
- 9 После окончания переливания:
 - а) затяните петлю на системе;
 - б) выньте иглы из пробки;
 - в) сделайте второй узел на системе.

Внимание! Для исключения нарушения герметичности при введении полимерной иглы в штуцер контейнера держать иглу за ребра для захвата, не брать за трубку и хвостовик иглы!

Полномерную иглу из штуцера контейнера не извлекать!

Стерильно внутри Апиогенно Нетоксично
Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.



ОАО «Синтез», Россия, 640008
Курганская обл., г. Курган
проспект Конституции, д. 7
Тел.: 8-800-600-00-80

Система-магистраль
для соединения полимерных контейнеров и стеклянных
бутылок однократного применения, стерильная «Синтез»
Исполнение 2

ТУ 9398-076-00480201-2015

Партия № 21020 Упаковщик 1
Годен до 1023
Количество изделий 300 шт.

После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

Системы в транспортной таре должны храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150, при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред

Ярлык на ящик

Система-магистраль для соединения
полимерных контейнеров и стеклянных
бутылок однократного применения,
стерильная «Синтез» Исполнение 2

по ТУ 9398-076-00480201-2015

Место для регистрационного номера и даты

STERILE R

Партия № 21020 Масса брутто 8 ± 1 кг
Годен до 1023 Ящик № 1
Количество изделий 300 шт.
Упаковщик 1

ОКК

Системы в транспортной таре должны храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150, при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред

После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

ОАО «Синтез»

Россия, 640008

Курганская обл.

г. Курган

проспект

Конституции, д. 7

Тел.: 8-800-600-00-08

Технический директор

Е.В. Дерябин





ОАО «Синтез», Россия, 640008
Курганская обл., г. Курган
проспект Конституции, д. 7
Тел.: 8-800-600-00-80

Система-магистраль
для соединения полимерных контейнеров и стеклянных
бутылок однократного применения, стерильная «Синтез»
Исполнение 1

ТУ 9398-076-00480201-2015

Партия № 11020 Упаковщик 1
Годен до 1023
Количество изделий 300 шт.

После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

Системы в транспортной таре должны храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150, при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред

Ярлык на ящик

Система-магистраль для соединения
полимерных контейнеров и стеклянных
бутылок однократного применения,
стерильная «Синтез» Исполнение 1

по ТУ 9398-076-00480201-2015

Место для регистрационного номера и даты

STERILE R

Партия № 11020 Масса брутто 8 ± 1 кг
Годен до 1023 Ящик № 1
Количество изделий 300 шт.
Упаковщик 1

ОКК

Системы в транспортной таре должны храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150, при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред
После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

ОАО «Синтез»

Россия, 640008
Курганская обл.
г. Курган
проспект
Конституции, д. 7

Тел.: 8-800-600-00-08

Технический директор

Е.В. Дерябин