


Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения, стерильное, с иглой полимерной совмещенной для подключения к бутылке или полимерному контейнеру ПР 23-07- «Синтез» по ТУ 9398-031-00480201-2015

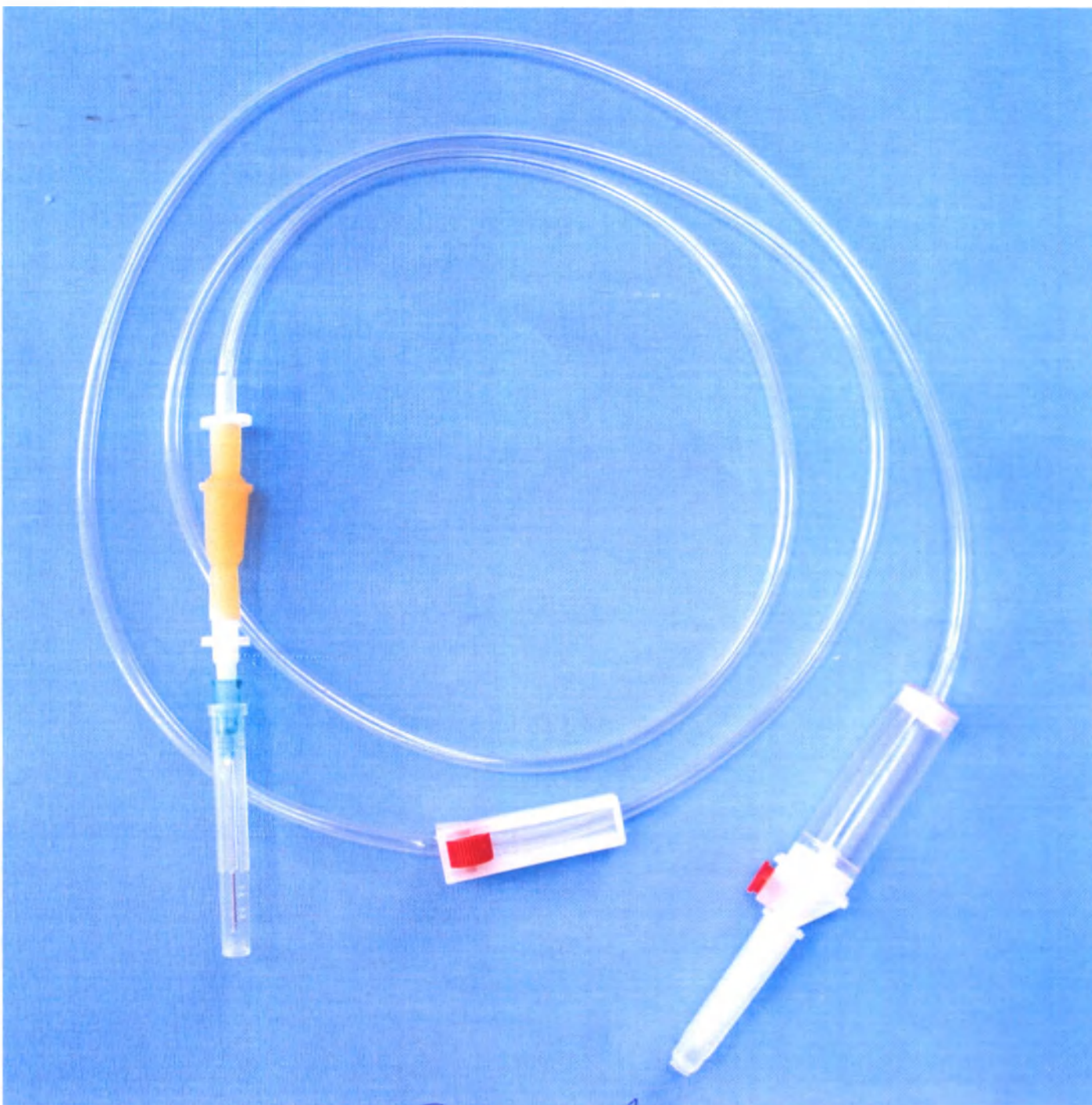


Технический директор



Е.В. Дерябин

Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения, стерильное, с иглой полимерной совмещенной для подключения к бутылке или полимерному контейнеру ПР 23-07- «Синтез» по ТУ 9398-031-00480201-2015

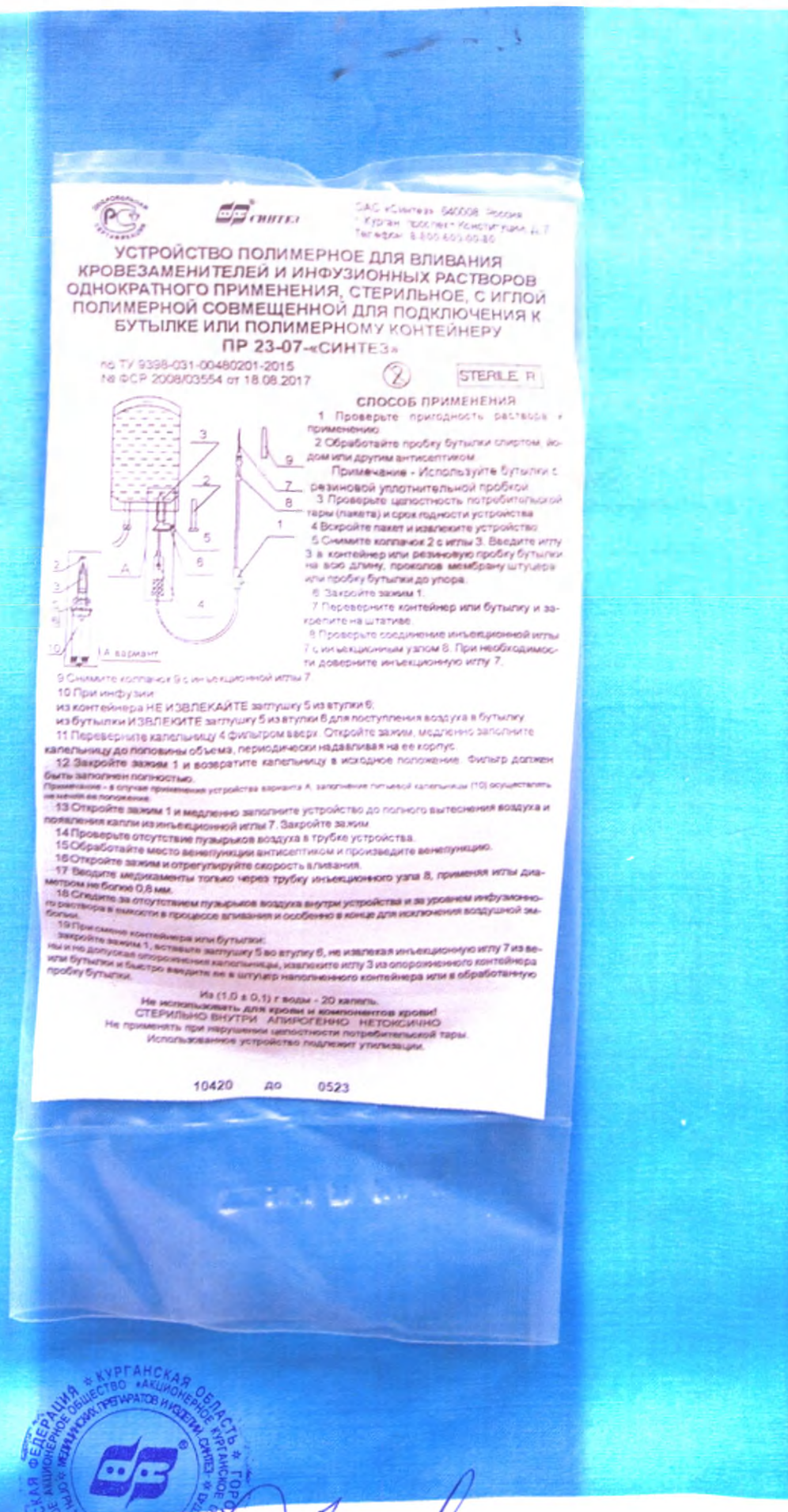

ОАО «Синтез» 640008, Россия
Курган, проспект Конституции д. 7
Тел/факс: 8 800 400 60 80


УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, СТЕРИЛЬНОЕ, С ИГЛОЙ ПОЛИМЕРНОЙ СОВМЕЩЕННОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БУТЫЛКЕ ИЛИ ПОЛИМЕРНОМУ КОНТЕЙНЕРУ ПР 23-07-«СИНТЕЗ»

по ТУ 9398-031-00480201-2015
№ ФСР 2008/03554 от 18.08.2017



STERILE R

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

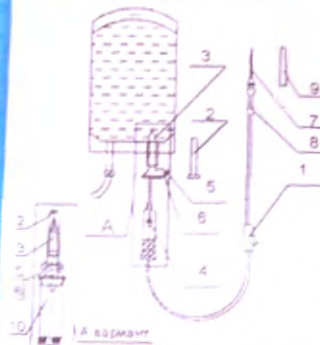

- 1 Проверьте пригодность раствора к применению.
- 2 Обработайте пробку бутылки спиртом, йодом или другим антисептиком.
Примечание - Используйте бутылки с резиновой уплотнительной пробкой.
- 3 Проверьте целостность потребительской тары (пакета) и срок годности устройства.
- 4 Вскройте пакет и извлеките устройство.
- 5 Снимите колпачок 2 с иглы 3. Введите иглу 3 в контейнер или резиновую пробку бутылки на всю длину, проколите мембрану шпателя или пробку бутылки до упора.
- 6 Закройте зажим 1.
- 7 Проверните контейнер или бутылку и закрепите на штативе.
- 8 Проверьте соединение инъекционной иглы 7 с инъекционным узлом 6. При необходимости доверните инъекционную иглу 7.

- 9 Снимите колпачок 9 с инъекционной иглы 7.
- 10 При инфузии из контейнера НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ затпушку 5 из втулки 6, из бутылки ИЗВЛЕКАЙТЕ затпушку 5 из втулки 6 для поступления воздуха в бутылку.
- 11 Переверните капельницу 4 фильтром вверх. Откройте зажим, медленно заполните капельницу до половины объема, периодически надавливая на ее корпус.
- 12 Закройте зажим 1 и возвратите капельницу в исходное положение. Фильтр должен быть заполнен полностью.

Примечание - в случае применения устройства варианта А, заполнение пипеткой капельницы (10) осуществляется на выдохе ее поршневым.

- 13 Откройте зажим 1 и медленно заполните устройство до полного вытеснения воздуха и появления капли из инъекционной иглы 7. Закройте зажим.
- 14 Проверьте отсутствие пузырьков воздуха в трубке устройства.
- 15 Обработайте место венопункции антисептиком и произведите венопункцию.
- 16 Откройте зажим и отрегулируйте скорость вливания.
- 17 Вводите медикаменты только через трубку инъекционного узла 8, применяя иглы диаметром не более 0,6 мм.
- 18 Следите за отсутствием пузырьков воздуха внутри устройства и за уровнем инфузионного раствора в емкости в процессе вливания и особенно в конце для исключения воздушной эмболии.
- 19 При окончании контейнера или бутылки:

- закройте зажим 1, вставьте затпушку 5 во втулку 6, не извлекая инъекционную иглу 7 из вены и не допуская опорожнения капельницы, извлеките иглу 3 из опорожненного контейнера или бутылки и быстро введите ее в шпатель наполненного контейнера или в обработанную пробку бутылки.

Из (1,0 ± 0,1) г воды - 20 капель.

Не использовать для кроли и компонентов крови!

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ АПИРОГЕННО НЕТОКСИЧНО


Не применять при нарушении целостности потребительской тары.

Использованное устройство подлежит утилизации.

10420 до 0523



Е.В. Дерябин

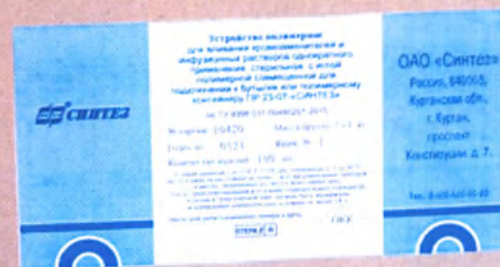

ОАО «СИНТЕЗ»

640008, Россия, г. Курган,
пр. Конституции, д. 7
тел./факс (3522) 48-16-89





Устройство полимерное
для вливания кровезаменителей и
инфузионных растворов однократного
применения, стерильное, с иглой
полимерной совмещенной для
подключения к бутылке или полимерному
контейнеру ПР 23-07-«СИНТЕЗ»

по ТУ 9398-031-00480201-2015

№ партии 10420

Масса брутто 7 ± 1 кг

Годен до 0523

Ящик № 1

Количество изделий 180 шт.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С
на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов,
в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

После транспортирования в условиях отрицательных температур
изделия в транспортной таре должны быть выдержаны
в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

Место для регистрационного номера и даты

STERILE R

OKK

ОАО «Синтез»

Россия, 640008,

Курганская обл.,

г. Курган,

проспект

Конституции, д. 7.

Тел.: 8-800-600-00-80



Технический директор

Е.В. Дерябин

Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов
однократного применения, стерильное, с иглой полимерной совмещенной для подключения
к бутылке или полимерному контейнеру ПР 23-07- «Синтез»
по ТУ 9398-031-00480201-2015

Макеты транспортной маркировки

Упаковочный лист



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл.,
г. Курган, проспект Конституции, д. 7.
Тел.: 8-800-600-00-80

Устройство полимерное для вливания
кровезаменителей и инфузионных растворов однократного
применения, стерильное, с иглой полимерной совмещенной
для подключения к бутылке или полимерному контейнеру
ПР 23-07- «Синтез» по ТУ 9398-031-00480201-2015

по ТУ 9398-031-00480201-2015

№ партии **10420**

Упаковщик **1**

Количество изделий **180** шт.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С
на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных
приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Ярлык на ящик



Устройство полимерное
для вливания кровезаменителей и
инфузионных растворов однократного
применения, стерильное, с иглой
полимерной совмещенной для
подключения к бутылке или полимерному
контейнеру ПР 23-07-«СИНТЕЗ»

по ТУ 9398-031-00480201-2015

№ партии **10420** Масса брутто **7±1** кг

Годен до **0523** Ящик № **1**

Количество изделий **180** шт.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С
на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов,
в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

После транспортирования в условиях отрицательных температур
изделия в транспортной таре должны быть выдержаны
в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

Место для регистрационного номера и даты

STERILE R

ОКК

ОАО «Синтез»

Россия, 640008,
Курганская обл.,
г. Курган,
проспект
Конституции, д. 7.

Тел.: 8-800-600-00-80

Технический директор

Е.В. Дерябин

Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов
однократного применения, стерильное, с иглой полимерной совмещенной для
подключения к бутылке или полимерному контейнеру
ПР 23-07- «Синтез» по ТУ 9398-031-00480201-2015




ОАО «Синтез», 640008, Россия
г. Курган, проспект Конституции, д.7
Телефон: 8-800-600-00-80

**УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ
КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, СТЕРИЛЬНОЕ, С ИГЛОЙ
ПОЛИМЕРНОЙ СОВМЕЩЕННОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К
БУТЫЛКЕ ИЛИ ПОЛИМЕРНОМУ КОНТЕЙНЕРУ
ПР 23-07-«СИНТЕЗ»**

по ТУ 9398-031-00480201-2015
№ ФСР 2008/03554 от 18.08.2017



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

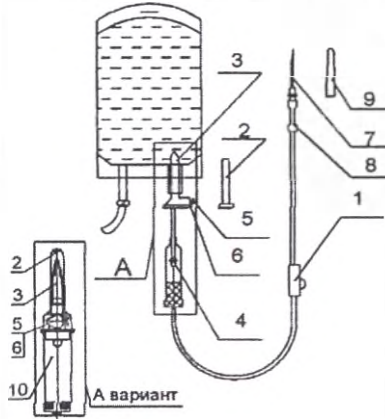

- 1 Проверьте пригодность раствора к применению.
- 2 Обработайте пробку бутылки спиртом, йодом или другим антисептиком.
Примечание - Используйте бутылки с резиновой уплотнительной пробкой.
- 3 Проверьте целостность потребительской тары (пакета) и срок годности устройства.
- 4 Вскройте пакет и извлеките устройство.
- 5 Снимите колпачок 2 с иглы 3. Введите иглу 3 в контейнер или резиновую пробку бутылки на всю длину, проколов мембрану штуцера или пробку бутылки до упора.
- 6 Закройте зажим 1.
- 7 Переверните контейнер или бутылку и закрепите на штативе.
- 8 Проверьте соединение инъекционной иглы 7 с инъекционным узлом 8. При необходимости доверните инъекционную иглу 7.
- 9 Снимите колпачок 9 с инъекционной иглы 7.
- 10 При инфузии:
из контейнера НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ заглушку 5 из втулки 6;
из бутылки ИЗВЛЕКАЙТЕ заглушку 5 из втулки 6 для поступления воздуха в бутылку.
- 11 Переверните капельницу 4 фильтром вверх. Откройте зажим, медленно заполните капельницу до половины объема, периодически надавливая на ее корпус.
- 12 Закройте зажим 1 и возвратите капельницу в исходное положение. Фильтр должен быть заполнен полностью.

Примечание - в случае применения устройства варианта А, заполнение литьевой капельницы (10) осуществлять не меняя ее положение.

- 13 Откройте зажим 1 и медленно заполните устройство до полного вытеснения воздуха и появления капли из инъекционной иглы 7. Закройте зажим.
- 14 Проверьте отсутствие пузырьков воздуха в трубке устройства.
- 15 Обработайте место венепункции антисептиком и произведите венепункцию.
- 16 Откройте зажим и отрегулируйте скорость вливания.
- 17 Вводите медикаменты только через трубку инъекционного узла 8, применяя иглы диаметром не более 0,8 мм.
- 18 Следите за отсутствием пузырьков воздуха внутри устройства и за уровнем инфузионного раствора в емкости в процессе вливания и особенно в конце для исключения воздушной эмболии.
- 19 При смене контейнера или бутылки:
закройте зажим 1, вставьте заглушку 5 во втулку 6, не извлекая инъекционную иглу 7 из вены и не допуская опорожнения капельницы, извлеките иглу 3 из опорожненного контейнера или бутылки и быстро введите ее в штуцер наполненного контейнера или в обработанную пробку бутылки.

Из $(1,0 \pm 0,1)$ г воды - 20 капель.
Не использовать для крови и компонентов крови!
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ АПИРОГЕННО НЕТОКСИЧНО
Не применять при нарушении целостности потребительской тары.
Использованное устройство подлежит утилизации.

10420 до 0523

Маркировка потребительской тары

Технический директор



Е.В. Дерябин