


Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки
однократного применения, стерильное ПК 21-01-«Синтез» по ТУ 32.50.13-059-00480201-2020




Технический директор

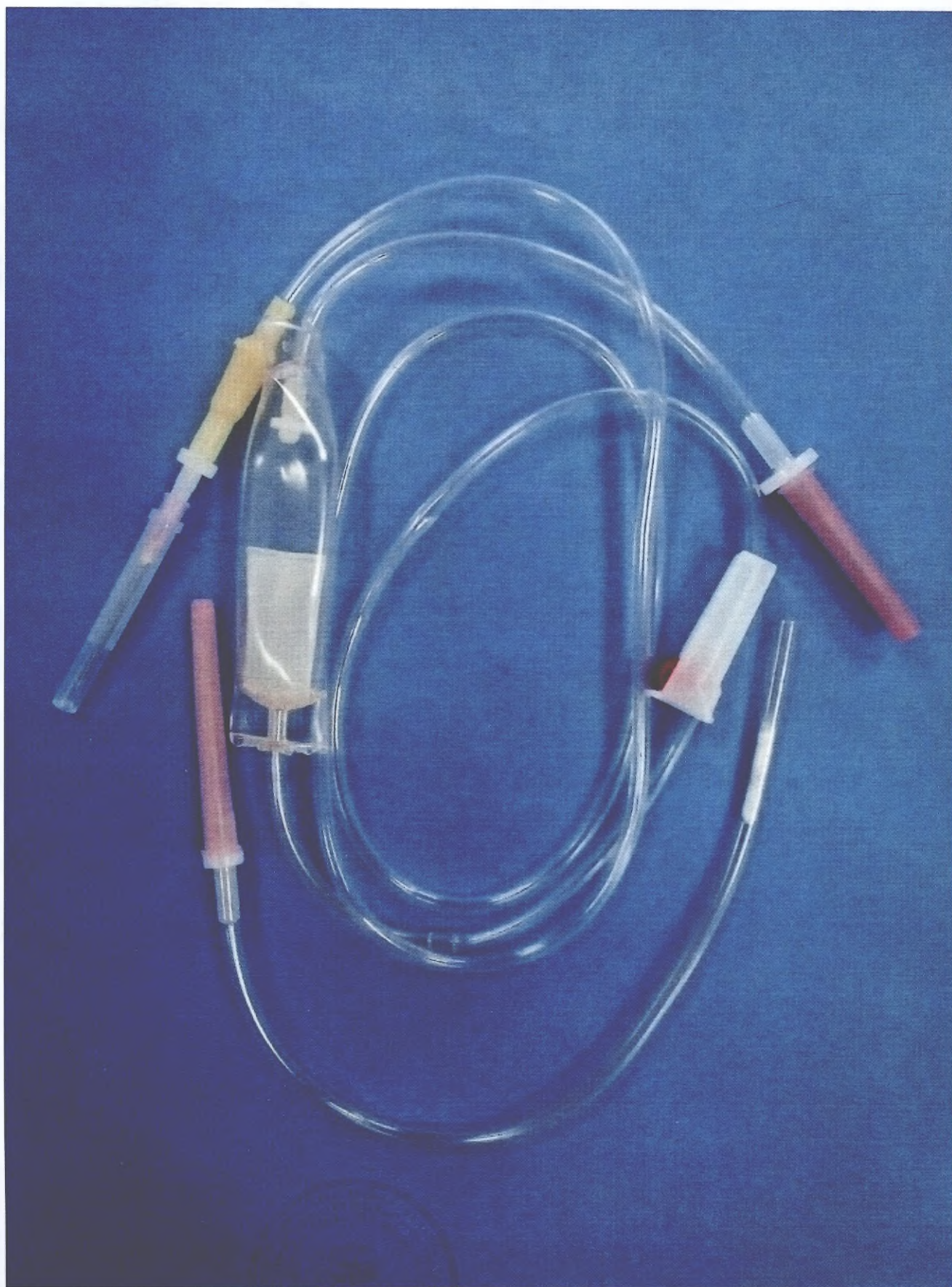

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to E.V. Deryabin.


Е.В. Дерябин

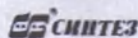

ООО «Синтез» Россия, 602026, Курганская обл.,
г. Курган, проспект Конституции, д. 1
Тел.: 8-800-600-00-80

**УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ
КРОВИ, КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ
РАСТВОРОВ ИЗ БУТЫЛКИ ОДНОКРАТНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ, СТЕРИЛЬНОЕ ПК 21-01-«СИНТЕЗ»
по ТУ 32.50.13-059-00480201-2020**

Место для регистрационного номера и даты регистрации

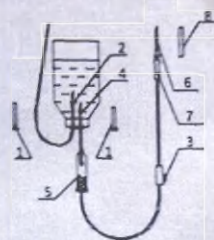

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1 Проверьте пригодность трансфузионной среды к применению. Перемешайте кровь в бутылке.
- 2 Обработайте пробку бутылки спиртом, йодом или другим антисептиком.
- Примечание - Используйте бутылки с резиновой уплотнительной пробкой.**
- 3 Проверьте целостность потребительской тары (пакета) и срок годности устройства.
- 4 Вскройте пакет и извлеките устройство.
- 5 Снимите колпачок 1 с иглы 2 воздуха.
- Введите иглу в пробку бутылки до упора. Закрепите трубку воздуховода вдоль бутылки так, чтобы ее конец был на уровне дна.

- 6 Закройте зажим 3. Снимите колпачок 1 с иглы 4 для подключения к бутылке. Введите иглу в пробку бутылки до упора.
- 7 Переверните бутылку и закрепите ее на штативе.
- 8 Проверьте соединение инъекционной иглы 6 с инъекционным узлом 7. При необходимости доверните инъекционную иглу 6.
- 9 Снимите колпачок 6 с инъекционной иглы 6.
- 10 Переверните капельницу 5 фильтром вверх. Откройте зажим, медленно заполните капельницу до половины объема.
- 11 Закройте зажим и возвратите капельницу в исходное положение. Фильтр должен быть заполнен полностью.
- 12 Откройте зажим и медленно заполните устройство до полного вытеснения воздуха и появления капли из инъекционной иглы 6. Закройте зажим.
- 13 Проверьте отсутствие пузырьков воздуха в трубке устройства.
- 14 Обработайте место венепункции антисептиком и проведите венепункцию.
- 15 Откройте зажим и отрегулируйте скорость переливания.
- 16 В случае закупорки иглы 4 закройте зажим 3 и осторожно сдавите корпус капельницы. При восстановлении тока жидкости откройте зажим.
- 17 Вводите медикаменты только через трубку инъекционного узла 7, применяя иглы диаметром не более 0,8 мм.
- 18 Следите за отсутствием пузырьков воздуха внутри устройства во время переливания и особенно в конце для исключения воздушной эмболии.
- 19 При смене бутылки закройте зажим. Не извлекайте инъекционную иглу из вены и не допускайте опорожнения капельницы. Извлеките иглу 2 и иглу 4 из опорожненной бутылки. Быстро введите в пробку наполненной бутылки вначале иглу 2, затем иглу 4.

Из (1,0 ± 0,1) л воды - 20 капель.

Стерильно внутри. Асептично. Нетоксично.

Использованное устройство подлежит утилизации.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.


10420 до 0523



Е.В. Дерябин

Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки
однократного применения, стерильное ПК 21-01-«Синтез» по ТУ 32.50.13-059-00480201-2020

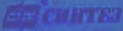

		Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки однократного применения, стерильное ПК 21-01-«Синтез» по ТУ 32.50.13-059-00480201-2020 (Место для индивидуального нанесения этикетки)		ОАО «Синтез»	
				Россия, 640008 Курганская обл. г. Курган проспект Конституции, д. 7	
Партия №	10420	Масса брутто	7 ± 1 кг		
Госн до	0523	Ящик №	1		
Упаковка	1				
Количество изделий	180 шт.				
Устройство в транспортной таре должно храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 3 до 40 °С на складах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, а также, защищаясь от света и агрессивной среды. После транспортировки в условиях повышенной температуры хранения в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.					

ОАО «СИНТЕЗ»

640008, Россия, г. Курган,
пр. Конституции, д. 7
тел./факс (3522) 48-16-89



Устройство полимерное
для переливания крови,
кровезаменителей и инфузионных
растворов из бутылки однократного
применения, стерильное
ПК 21-01-«Синтез»

по ТУ 32.50.13-059-00480201-2020

Место для регистрационного номера и даты

STERILE Я

Партия № 10420

Масса брутто 7 ± 1 кг

Годен до 0523

Ящик № 1

Упаковщик 1

Количество изделий 180 шт.

ОКК

Устройства в транспортной таре должны храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред

После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

ОАО «Синтез»

Россия, 640008

Курганская обл.

г. Курган

проспект

Конституции, д. 7

Тел.: 8-800-600-00-08

Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки однократного применения, стерильное ПК 21-01-«Синтез»
по ТУ 32.50.13-059-00480201-2020

Потребительская тара



ОАО «Синтез», Россия, 640008
Курганская обл., г. Курган
проспект Конституции, д. 7
Тел.: 8-800-600-00-08


**УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ
КРОВИ, КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ
РАСТВОРОВ ИЗ БУТЫЛКИ ОДНОКРАТНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ, СТЕРИЛЬНОЕ ПК 21-01-«СИНТЕЗ»**
по ТУ 32.50.13-059-00480201-2020

Место для регистрационного номера и даты регистрации



STERILE R

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

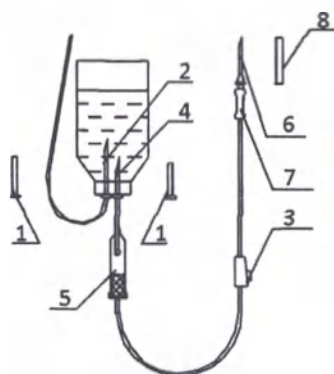

- 1 Проверьте пригодность трансфузионной среды к применению. Перемешайте кровь в бутылке.
- 2 Обработайте пробку бутылки спиртом, йодом или другим антисептиком.
Примечание - Используйте бутылки с резиновой уплотнительной пробкой.
- 3 Проверьте целостность потребительской тары (пакета) и срок годности устройства.
- 4 Вскройте пакет и извлеките устройство.
- 5 Снимите колпачок 1 с иглы 2 воздуховода. Введите иглу в пробку бутылки до упора. Закрепите трубку воздуховода вдоль бутылки так, чтобы ее конец был на уровне дна.
- 6 Закройте зажим 3. Снимите колпачок 1 с иглы 4 для подключения к бутылке. Введите иглу в пробку бутылки до упора.
- 7 Переверните бутылку и закрепите ее на штативе.
- 8 Проверьте соединение инъекционной иглы 6 с инъекционным узлом 7. При необ-

- ходимости доверните инъекционную иглу 6.
- 9 Снимите колпачок 8 с инъекционной иглы 6.
 - 10 Переверните капельницу 5 фильтром вверх. Откройте зажим, медленно заполните капельницу до половины объема.
 - 11 Закройте зажим и возвратите капельницу в исходное положение. Фильтр должен быть заполнен полностью.
 - 12 Откройте зажим и медленно заполните устройство до полного вытеснения воздуха и появления капли из инъекционной иглы 6. Закройте зажим.
 - 13 Проверьте отсутствие пузырьков воздуха в трубке устройства.
 - 14 Обработайте место венепункции антисептиком и произведите венепункцию.
 - 15 Откройте зажим и отрегулируйте скорость переливания.
 - 16 В случае закупорки иглы 4 закройте зажим 3 и осторожно сдавите корпус капельницы. При восстановлении тока жидкости откройте зажим.
 - 17 Вводите медикаменты только через трубку инъекционного узла 7, применяя иглы диаметром не более 0,8 мм.
 - 18 Следите за отсутствием пузырьков воздуха внутри устройства во время переливания и особенно в конце для исключения воздушной эмболии.
 - 19 При смене бутылки закройте зажим. Не извлекая инъекционную иглу из вены и не допуская опорожнения капельницы, извлеките иглу 2 и иглу 4 из опорожненной бутылки. Быстро введите в пробку наполненной бутылки вначале иглу 2, затем иглу 4.

Из (1,0 ± 0,1) г воды - 20 капель

Стерильно внутри Апиrogenно Нетоксично

Не применять при нарушении целостности потребительской тары

Использованное устройство подлежит утилизации

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Место для
переменных
данных (номер
партии, «Годен
до» или «до»
(месяц, год))



Упаковочный лист



ОАО «Синтез», Россия, 640008
Курганская обл., г. Курган
проспект Конституции, д. 7
Тел.: 8-800-600-00-80

Устройство полимерное
для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных
растворов из бутылки однократного применения, стерильное
ПК 21-01-«Синтез»

по ТУ 32.50.13-059-00480201-2020

Партия №	10420	Упаковщик	1
Годен до	0523		
Количество изделий	180	шт.	

Хранить в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С
на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в
местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Ярлык на ящик



Устройство полимерное
для переливания крови,
кровезаменителей и инфузионных
растворов из бутылки однократного
применения, стерильное
ПК 21-01-«Синтез»

по ТУ 32.50.13-059-00480201-2020

Место для регистрационного номера и даты

STERILE R

Партия №	10420	Масса брутто	7 ± 1 кг
Годен до	0523	Ящик №	1
Упаковщик	1		
Количество изделий	180	шт.	

ОКК

Устройства в транспортной таре должны храниться в условиях хранения 1
по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии
не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных
от света и агрессивных сред
После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия
в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных
климатических условиях не менее 24 ч.

ОАО «Синтез»

Россия, 640008

Курганская обл.

г. Курган

проспект

Конституции, д. 7

Тел.: 8-800-600-00-08



Технический директор

Е.В. Дерябин

Верно:

Технический
директор

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
(2) листов

