


Устройство полимерное для взятия крови в бутылку однократного применения, стерильное
БК 10-01-«ЛЛ»-«Синтез» по ТУ 32.50.13-053-00480201-2020

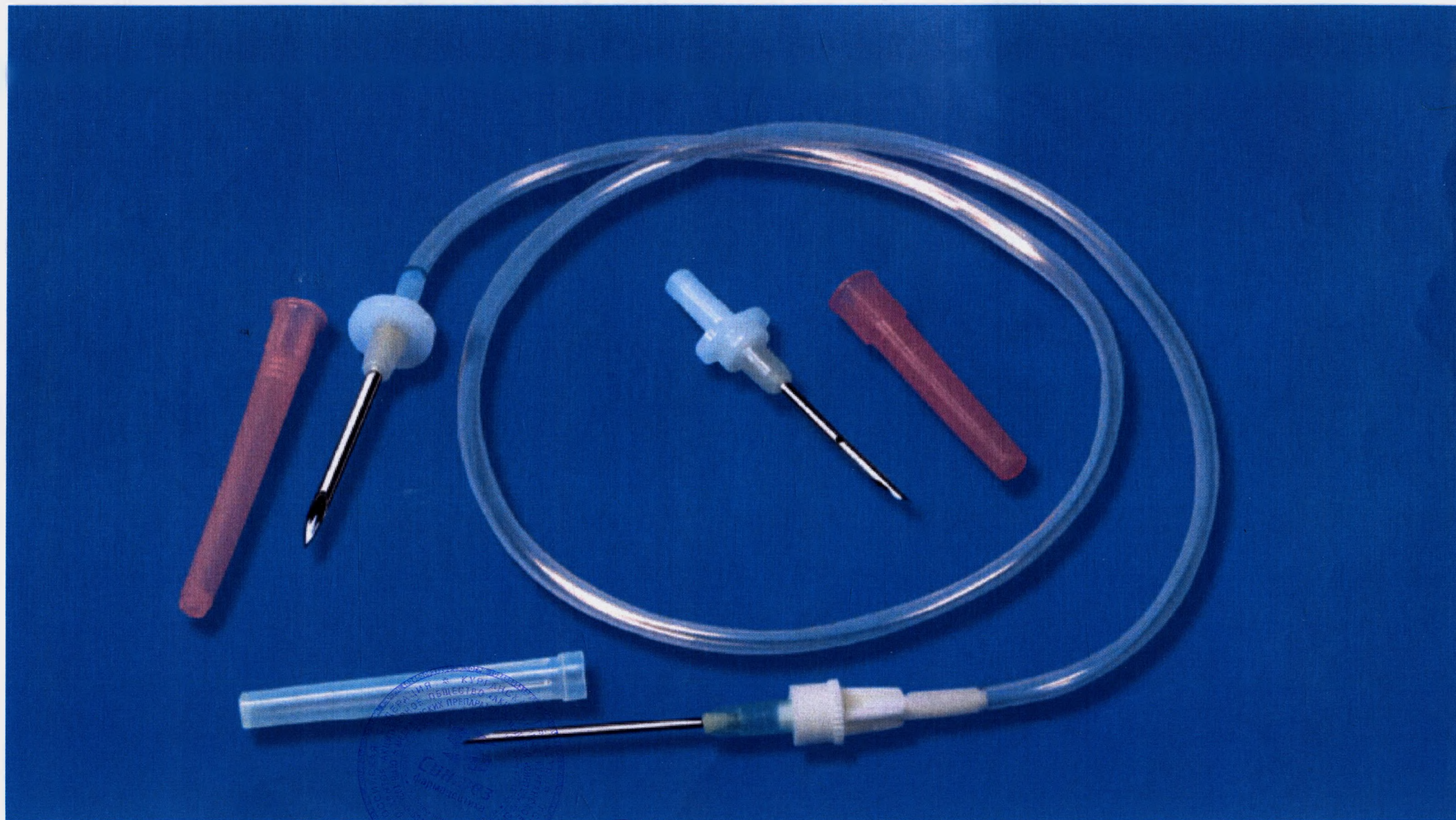

Технический директор

Е.В. Дерябин

Устройство полимерное для взятия крови в бутылку однократного применения, стерильное
БК 10-01-«ЛЛ»-«Синтез» по ТУ 32.50.13-053-00480201-2020




ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл.,
г. Курган, проспект Конституции, д. 7
Тел. 8-800-500-00-80

Устройство полимерное для взятия крови
в бутылку однократного применения, стерильное
БК 10-01-«ЛЛ»-«Синтез»
по ТУ 32.50.13-053-00480201-2020

Место для регистрационного номера и даты регистрации



STERILE R

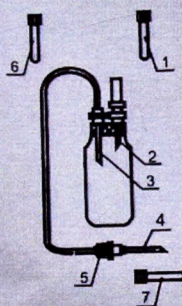

Способ применения

- 1 Пробку бутылки обработать спиртом, йодом или другим антисептиком.
Примечание - Используйте бутылки с резиновой уплотнительной пробкой.
- 2 Проверить целостность потребительской тары (пакета) и срок годности.
- 3 Пакет вскрыть и вынуть устройство.
- 4 Колпачок 1 снять с иглы 2 воздуховода. Иглу ввести в пробку бутылки до упора.
- 5 Колпачок 6 снять с иглы 3 для подключения к бутылке. Иглу 3 ввести в пробку бутылки до упора.
- 6 Проверить соединение инъекционной иглы 4 с коннектором «Луер-Локи» 5. При необходимости повернуть иглу инъекционную 4 до упора.
- 7 Место венепункции обработать спиртом, йодом или другим антисептиком.
- 8 Колпачок 7 снять с иглы инъекционной 4 и произвести венепункцию. Кровь, поступающую в бутылку, периодически перемешивать.

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ АПИРОГЕННО НЕТОКСИЧНО

Использованное устройство подлежит утилизации.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

10420 до 0523

Технический директор

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Е.В. Дерябин

Устройство полимерное для взятия крови в бутылку однократного применения, стерильное ВК 10-01-«ЛЛ»-«Синтез»
по ТУ 32.50.13-053-00480201-2020



Устройство полимерное для взятия крови в бутылку однократного применения, стерильное ВК 10-01-«ЛЛ»-«Синтез» по ТУ 32.50.13-053-00480201-2020 Место для регистрационного номера и даты			
		ОАО «СИНТЕЗ»	
		Россия 640008	
		Курганская обл.	
		г. Курган	
		проезд	
		Конституции, д. 7	
		Тел. 8 800 930 00 48	
Партия № 10420	Масса брутто 7 ± 1 кг		
Голен до 0523	Ящик № 1		
Количество изделий 300 шт	ОКК		
Упаковка 1			
Устройство в транспортный картон помещено в упаковке из полипропилена (ПП) 1200 мм (длина) × 120 мм (ширина) × 120 мм (высота) для размещения в транспортном контейнере. Упаковка из полипропилена (ПП) 1200 мм (длина) × 120 мм (ширина) × 120 мм (высота) для размещения в транспортном контейнере. Упаковка из полипропилена (ПП) 1200 мм (длина) × 120 мм (ширина) × 120 мм (высота) для размещения в транспортном контейнере.			

ОАО «СИНТЕЗ»
640008, Россия, г. Курган,
пр. Конституции, д. 7
тел./факс (3522) 48-16-89

Устройство полимерное для взятия крови в бутылку однократного применения, стерильное ВК 10-01-«ЛЛ»-«Синтез»
по ТУ 32.50.13-053-00480201-2020

 СИНТЕЗ

**Устройство полимерное для взятия
крови в бутылку однократного
применения, стерильное
ВК 10-01-«ЛЛ»-«Синтез»**

по ТУ 32.50.13-053-00480201-2020

Место для регистрационного номера и даты

STERILE R

Партия № 10420 Масса брутто 7 ± 1 кг
Годен до 0523 Ящик № 1
Количество изделий 300 шт.
Упаковщик 1

ОКК

Устройства в транспортной таре должны храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред

После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

ОАО «Синтез»

Россия, 640008

Курганская обл.

г. Курган

проспект

Конституции, д. 7

Тел.: 8-800-600-00-08

Технический директор

Е.В. Дерябин

Устройство полимерное для взятия крови в бутылку однократного применения, стерильное ВК 10-01-«ЛЛ»-«Синтез»
по ТУ 32.50.13-053-00480201-2020


Потребительская тара




ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл.,
г. Курган, проспект Конституции, д. 7.
Тел: 8-800-600-00-80

Устройство полимерное для взятия крови
в бутылку однократного применения, стерильное
ВК 10-01-«ЛЛ»-«Синтез»
по ТУ 32.50.13-053-00480201-2020

Место для регистрационного номера и даты регистрации

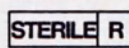

Способ применения

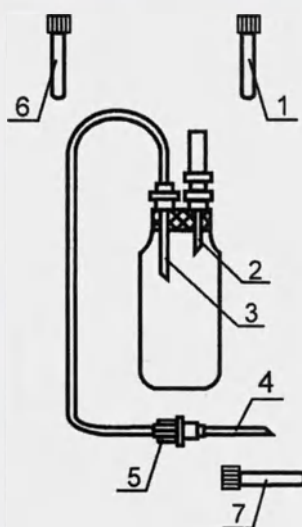

- 1 Пробку бутылки обработать спиртом, йодом или другим антисептиком.
- 2 Проверить целостность потребительской тары (пакета) и срок годности.
- 3 Пакет вскрыть и вынуть устройство.
- 4 Колпачок 1 снять с иглы 2 воздуховода. Иглу ввести в пробку бутылки до упора.
- 5 Колпачок 6 снять с иглы 3 для подключения к бутылке. Иглу 3 ввести в пробку бутылки до упора.
- 6 Проверить соединение инъекционной иглы 4 с коннектором «Луер-Лок» 5. При необходимости повернуть иглу инъекционную 4 до упора.
- 7 Место венепункции обработать спиртом, йодом или другим антисептиком.
- 8 Колпачок 7 снять с иглы инъекционной 4 и произвести венепункцию. Кровь, поступающую в бутылку, периодически перемешивать.

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ АПИРОГЕННО НЕТОКСИЧНО

Использованное устройство подлежит утилизации.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Место для переменных данных:
номер партии,
«Годен до» или «до»
и дата (месяц, год)

Макеты транспортной маркировки

Упаковочный лист



ОАО «Синтез», Россия, 640008
Курганская обл., г. Курган
проспект Конституции, д. 7
Тел.: 8-800-600-00-80

Устройство полимерное для взятия крови в бутылку однократного применения, стерильное ВК 10-01-«ЛЛ»-«Синтез»

по ТУ 32.50.13-053-00480201-2020

Партия №

Упаковщик

Годен до

Количество изделий

шт.

После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

Хранить в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Ярлык на ящик



Устройство полимерное для взятия крови в бутылку однократного применения, стерильное ВК 10-01-«ЛЛ»-«Синтез»

по ТУ 32.50.13-053-00480201-2020

Место для регистрационного номера и даты

STERILE R

Партия №

Масса брутто кг

Годен до

Ящик №

Количество изделий

шт.

Упаковщик

ОКК

Устройства в транспортной таре должны храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред

После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

ОАО «Синтез»

Россия, 640008

Курганская обл.

г. Курган

проспект

Конституции, д. 7

Тел.: 8-800-600-00-88

Технический директор



Е.В. Дерябин

Верно:

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
(2) листов

Технический



Е.В. Дербин