


Устройство полимерное для переливания крови, компонентов крови, кровезаменителей и инфузионных растворов «Синтез» однократного применения, стерильное с иглой полимерной совмещенной для подключения к бутылке и к полимерному контейнеру ПК 23-07 по ТУ 32.50.13-032-00480201-2020

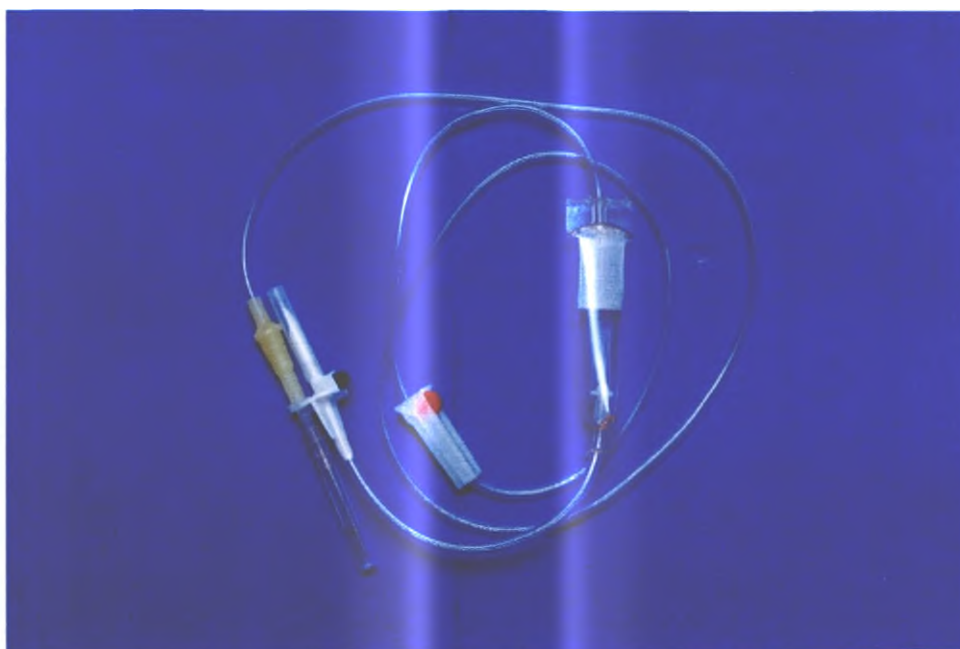

Технический директор

Е.В. Дерябин



Транспортная тара

Устройство полимерное для переливания крови, компонентов крови, кровезаменителей и инфузионных растворов «Синтез» однократного применения, стерильное с иглой полимерной совмещенной для подключения к бутылке и к полимерному контейнеру
ПК 23-07 по ТУ 32.50.13-032-00480201-2020



Технический директор

Е.В. Дерябин

Макет по проекту ТУ 32.50.13-032-00480201-2020

Устройство полимерное для переливания крови, компонентов крови, кровезаменителей и инфузионных растворов «Синтез» однократного применения, стерильное с иглой полимерной совмещенной для подключения к бутылке и к полимерному контейнеру ПК 23-07

Потребительская тара



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 7.
Тел. 8-800-600-00-80

УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, КОМПОНЕНТОВ КРОВИ, КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ «СИНТЕЗ» ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, СТЕРИЛЬНОЕ С ИГЛОЙ ПОЛИМЕРНОЙ СОВМЕЩЕННОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БУТЫЛКЕ И К ПОЛИМЕРНОМУ КОНТЕЙНЕРУ ПК 23-07

по ТУ 32.50.13-032-00480201-2020


Место для регистрационного номера и даты регистрации



STERILE R

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1 Проверьте пригодность трансфузионной среды к применению. Перемешайте содержимое в контейнере или бутылке.
- 2 Обработайте резиновую пробку бутылки спиртом, йодом или другим антисептиком. Примечание - используйте бутылки с резиновой уплотнительной пробкой.
- 3 Проверьте целостность потребительской тары (пакета) и срок годности устройства.
- 4 Вскройте пакет и извлеките устройство.
- 5 Снимите колпачок 2 с иглы 3. Введите иглу 3 в контейнер на всю длину, проколов мембрану штуцера или пробку бутылки до упора.
- 6 Закройте зажим 1.
- 7 Переверните контейнер или бутылку и подвесьте на штативе.
- 8 Проверьте соединение инъекционной иглы 7 с инъекционным узлом 8. При необходимости поверните инъекционную иглу 7 (в случае по-

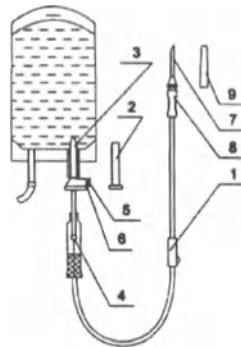

ставки инъекционной иглы в потребительской таре, вскройте тару, извлеките и присоедините иглу к инъекционному узлу 8).

9 Снимите колпачок 9 с инъекционной иглы 7.

10 При инфузии:

из контейнера НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ заглушку 5 из втулки 6;

из бутылки ИЗВЛЕКАЙТЕ заглушку 5 из втулки 6 для поступления воздуха в бутылку.

11 Переверните капельницу 4 фильтром вверх. Откройте зажим, медленно заполните капельницу до половины объема, периодически надавливая на ее корпус.

12 Закройте зажим и возвратите капельницу в исходное положение. Фильтр должен быть заполнен полностью.

13 Откройте зажим 1 и медленно заполните устройство до полного вытеснения воздуха и появления капли из инъекционной иглы 7. Закройте зажим.

14 Проверьте отсутствие пузырьков воздуха в трубке устройства.

15 Обработайте место венепункции антисептиком и произведите венепункцию.

16 Откройте зажим и отрегулируйте скорость вливания.

17 Вводите медикаменты только через трубку инъекционного узла 8, применяя иглы диаметром не более 0,8 мм.

18 Следите за отсутствием пузырьков воздуха внутри устройства и за уровнем инфузионного раствора в емкостях в процессе вливания и особенно в конце для исключения воздушной эмболии.

19 При смене контейнера или бутылки: закройте зажим 1, вставьте заглушку 5 во втулку 6, не извлекая инъекционную иглу 7 из вены и не допуская опорожнения капельницы, извлеките иглу 3 из опорожненного контейнера или бутылки и быстро введите ее в штуцер наполненного контейнера или в обработанную пробку бутылки.

Из (1,0 ± 0,1) г воды - 20 капель.

Стерильно внутри Апиrogenно Нетоксично

Использованное устройство подлежит утилизации.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С, на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Место для переменных данных (номер партии, «Годен до» или «до» и дата (месяц, год))

Технический директор



Е.В. Дерябин

Макет по проекту ТУ 32.50.13-032-00480201-2020

Устройство полимерное для переливания крови, компонентов крови, кровезаменителей и инфузионных растворов «Синтез» однократного применения, стерильное с иглой полимерной совмещенной для подключения к бутылке и к полимерному контейнеру ПК 23-07

Лист упаковочный, ярлык на ящик



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл.,
г. Курган, проспект Конституции, д. 7.
Тел.: 8-800-600-00-80

Устройство полимерное
для переливания крови, компонентов крови, кровезаменителей
и инфузионных растворов «Синтез» однократного применения,
стерильное с иглой полимерной совмещенной для подключения
к бутылке и к полимерному контейнеру ПК 23-07

по ТУ 32.50.13-032-00480201-2020

№ партии

Упаковщик

Количество изделий

шт.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С
на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных
приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.



Устройство полимерное
для переливания крови, компонентов крови,
кровезаменителей и инфузионных растворов
«Синтез» однократного применения, стерильное
с иглой полимерной совмещенной для подключения
к бутылке и к полимерному контейнеру ПК 23-07

по ТУ 32.50.13-032-00480201-2020

№ партии Масса брутто кг

Годен до Ящик №

Упаковщик

Количество изделий шт.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С
на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов,
в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

После транспортирования в условиях отрицательных температур
изделия в транспортной таре должны быть выдержаны
в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

Место для регистрационного номера и даты

STERILE R

ОКК

ОАО «Синтез»

Россия, 640008,
Курганская обл.,
г. Курган,
проспект
Конституции, д. 7.

Тел.: 8-800-600-00-80

Технический директор



Е.В. Дерябин

«Устройство полимерное для переливания крови, компонентов крови, кровезаменителей и инфузионных растворов
«Синтез» однократного применения, стерильное с иглой полимерной совмещенной
для подключения к бутылке и к полимерному контейнеру ПК 23-07»



Макет по проекту ТУ 32.50.13-032-00480201-2020

Устройство полимерное для переливания крови, компонентов крови, кровезаменителей и инфузионных растворов «Синтез» однократного применения, стерильное с иглой полимерной совмещенной для подключения к бутылке и к полимерному контейнеру ПК 23-07

Лист упаковочный



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл.,
г. Курган, проспект Конституции, д. 7.
Тел.: 8-800-600-00-80

Устройство полимерное
для переливания крови, компонентов крови, кровезаменителей
и инфузионных растворов «Синтез» однократного применения,
стерильное с иглой полимерной совмещенной для подключения
к бутылке и к полимерному контейнеру ПК 23-07

по ТУ 32.50.13-032-00480201-2020

№ партии

Упаковщик

Количество изделий

шт.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 40 °С
на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных
приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Технический директор



Е.В. Дерябин