


УТВЕРЖДАЮ
Директор по развитию
АО «Елатомский приборный завод

 Никитина Т.Н.
«07» 09 2023

Руководства по эксплуатации медицинского изделия
«Шкафы медицинские по ГИКС.942810.107 ТУ»

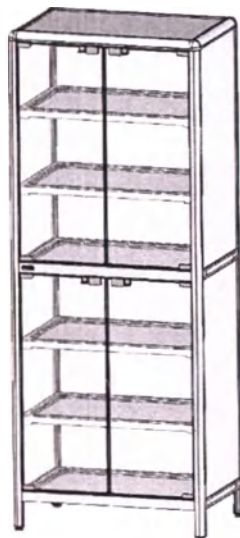

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ (мод.1) вариант поставки 1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.161 РЭ

ОМ 29.438.05 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский лабораторный (мод.1) вариант поставки 1 (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, лекарственных препаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться на шкаф и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 25,2±2,5 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (649х440х1643)±4.

Габаритный размер изделия по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку полимерную – 10 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры в виде подсадных ножек в диапазоне не менее 5 мм. Толщина стеклянной дверцы – 4 мм.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из алюминиевого профиля с заполнением стенок сэндвич-панелью. Шкаф разделен на 2 равные секции, внутри каждой секции расположены по 3 пластиковые съемные полки. В каждой из секций 2 верхние полки регулируются по высоте установки. Верхняя и нижняя секции закрываются каждая индивидуально 2-мя прозрачными стеклянными дверцами с фиксацией магнитами. Шкаф устанавливается на 4 мебельные ножки. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский лабораторный мод. 1, вариант поставки 1	
• Шкаф медицинский лабораторный мод. 1, вариант поставки 1 - 1 компл., в составе:	
— Крышка	1 шт.
— Стенка левая	1 шт.
— Стенка правая	1 шт.
— Стенка задняя верхняя	1 шт.
— Прогон задний	2 шт.
— Стенка задняя нижняя	1 шт.
— Прогон средний передний	1 шт.
— Прогон нижний передний	1 шт.
— Заглушка прогона и крышки	4 шт.
— Заглушка под ограничитель	2 шт.
— Полка пластиковая	6 шт.
— Стеклянная дверца	4 шт.
— Опора	4 шт.
— Накладка для магнитной защёлки	4 шт.
— Петля	8 шт.
— Ручка стеклянных дверей	4 шт.
— Поддержатель	24 шт.
— Заглушка декоративная	1 шт.
— Площадка магнитной защёлки	4 шт.
— Саморез 3x16	8 шт.
— Магнитная защёлка	4 шт.
— Саморез 3x12	18 шт.
— Ограничитель стеклянных дверей	2 шт.
— Ключ шестигранный малый	1 шт.
— Ключ шестигранный большой	1 шт.
— Логотип компании	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

ОМ 29 438.05 от 01.08.2023 г.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждениях составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.**7. Гарантия изготовителя**

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский лабораторный (мод.1) вариант поставки 1 изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Код

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25


 **ЕЛАМЕД**

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lrp@elamed.com

Сайт компании: lrp.elamed.com

Регистрационное удостоверение

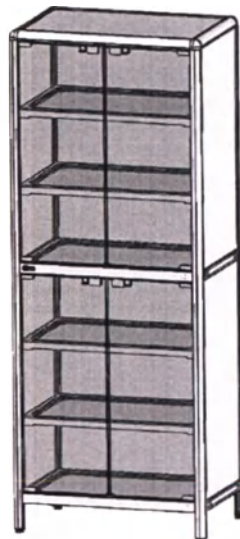

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ (мод.1) вариант поставки 2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.161-01 РЭ

Шкаф медицинский лабораторный (мод.1) вариант поставки 2 (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, лекарственных препаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться на шкаф и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 25,2±2,5 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (649х440х1643)±4.

Габаритный размер изделия по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку полимерную – 10 кг.

2.3 Зазоры в просах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры в виде подсадных ножек в диапазоне не менее 5 мм. Толщина стеклянной дверцы – 4 мм.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из алюминиевого профиля с заполнением стенок сэндвич-панелью. Шкаф разделен на 2 равные секции, внутри каждой секции расположены по 3 пластиковые съемные полки. В каждой из секций 2 верхние полки регулируются по высоте установки. Верхняя и нижняя секции закрываются каждая индивидуально 2-мя стеклянными дверцами со средней степенью тонировки. Дверцы фиксируются магнитами. Шкаф устанавливается на 4 мебельные ножки. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский лабораторный мод. 1, вариант поставки 2	
• Шкаф медицинский лабораторный мод. 1, вариант поставки 2 - 1 компл., в составе:	
— Крышка	1 шт.
— Стенка левая	1 шт.
— Стенка правая	1 шт.
— Стенка задняя верхняя	1 шт.
— Прогон задний	2 шт.
— Стенка задняя нижняя	1 шт.
— Прогон средний передний	1 шт.
— Прогон нижний передний	1 шт.
— Заглушка прогона и крышки	4 шт.
— Заглушка под ограничитель	2 шт.
— Полка пластиковая	6 шт.
— Стеклянная дверца	4 шт.
— Опора	4 шт.
— Накладка для магнитной защёлки	4 шт.
— Петля	8 шт.
— Ручка стеклянных дверей	4 шт.
— Полкодержатель	24 шт.
— Заглушка декоративная	1 шт.
— Площадка магнитной защёлки	4 шт.
— Саморез 3x16	8 шт.
— Магнитная защёлка	4 шт.
— Саморез 3x12	18 шт.
— Ограничитель стеклянных дверей	2 шт.
— Ключ шестигранный малый	1 шт.
— Ключ шестигранный большой	1 шт.
— Логотип компании	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкафа соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функций устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский лабораторный (мод.1) вариант поставки 2 изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Код

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25




Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpw@elamed.com

Сайт компании: lpw.elamed.com

Регистрационное удостоверение

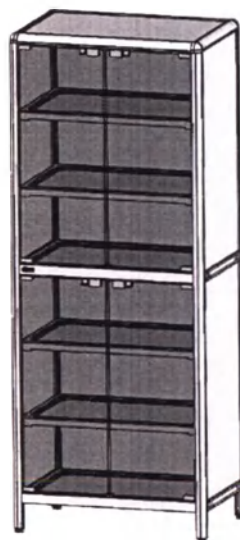

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ (мод.1) вариант поставки 3

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.161-02 РЗ

ОМ 29.440.05 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский лабораторный (мод.1) вариант поставки 3 (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, лекарственных препаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться на шкаф и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 25,2±2,5 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (649x440x1643)±4.

Габаритный размер изделия по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку полимерную – 10 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры в виде подсадных ножек в диапазоне не менее 5 мм. Толщина стеклянной дверцы – 4 мм.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из алюминиевого профиля с заполнением стенок сэндвич-панелью. Шкаф разделен на 2 равные секции, внутри каждой секции расположены по 3 пластиковые съемные полки. В каждой секции 2 верхние полки регулируются по высоте установки. Верхняя и нижняя секции закрываются каждая индивидуально 2-мя стеклянными дверцами с сильной степенью тонировки. Дверцы фиксируются магнитами. Шкаф устанавливается на 4 мебельные ножки. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский лабораторный мод. 1, вариант поставки 3	
• Шкаф медицинский лабораторный мод. 1, вариант поставки 3 - 1 компл., в составе:	
— Крышка	1 шт.
— Стенка левая	1 шт.
— Стенка правая	1 шт.
— Стенка задняя верхняя	1 шт.
— Прогон задний	2 шт.
— Стенка задняя нижняя	1 шт.
— Прогон средний передний	1 шт.
— Прогон нижний передний	1 шт.
— Заглушка прогона и крышки	4 шт.
— Заглушка под ограничитель	2 шт.
— Полка пластиковая	6 шт.
— Стеклянная дверца	4 шт.
— Опора	4 шт.
— Накладка для магнитной защёлки	4 шт.
— Петля	8 шт.
— Ручка стеклянных дверей	4 шт.
— Полкодержатель	24 шт.
— Заглушка декоративная	1 шт.
— Площадка магнитной защёлки	4 шт.
— Саморез 3x16	8 шт.
— Магнитная защёлка	4 шт.
— Саморез 3x12	18 шт.
— Ограничитель стеклянных дверей	2 шт.
— Ключ шестигранный малый	1 шт.
— Ключ шестигранный большой	1 шт.
— Логотип компании	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

ОМ 29 440.05 от 01.08.2023 г.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждениях составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепежные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкафа соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функций устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский лабораторный (мод.1) вариант поставки 3 изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Код

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25




Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: ipri@elamed.com

Сайт компании: ipri.elamed.com

Регистрационное удостоверение

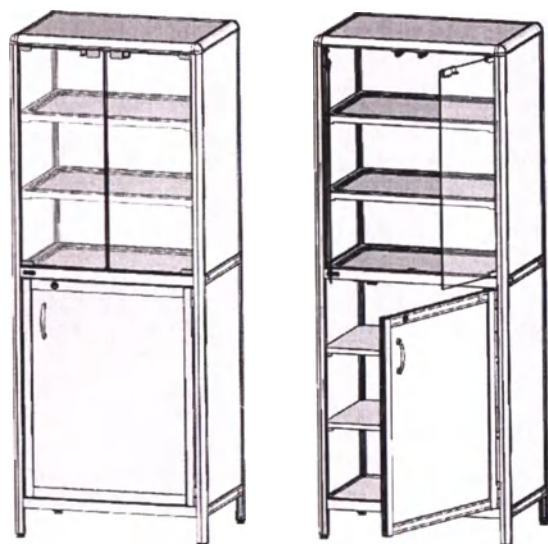

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ (мод.2) вариант поставки 1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.162 РЭ

ОМ 29.442.05 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский лабораторный (мод.2) вариант поставки 1 (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, лекарственных препаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться на шкаф и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 27,1±2,7 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (649х449х1643)±4.

Габаритный размер изделия по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку полимерную – 10 кг;

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры в виде подсадных ножек в диапазоне не менее 5 мм. Толщина стеклянной двери – 4 мм.

2.4 При эксплуатации шкафа устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из алюминиевого профиля с заполнением стенок сэндвич-панелью. Шкаф разделен на 2 равные секции. В верхней секции расположены 3 пластиковые съемные полки, из которых 2 верхние полки регулируются по высоте установки. В нижней секции расположены 3 съемные полки из ЛДСП, из которых 2 верхние полки регулируются по высоте установки. Верхняя секция закрывается 2-мя прозрачными стеклянными дверцами с фиксацией магнитами. Нижняя секция закрывается дверью из алюминиевого профиля с заполнением сэндвич-панелью. Нижняя дверь фиксируется магнитом и замком. Шкаф устанавливается на 4 мебельные ножки. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский лабораторный мод. 2, вариант поставки 1	
• Шкаф медицинский лабораторный мод. 2, вариант поставки 1 – 1 компл., в составе:	
– Крышка	1 шт.
– Стенка левая	1 шт.
– Стенка правая	1 шт.
– Стенка задняя верхняя	1 шт.
– Прогон задний	1 шт.
– Стенка задняя нижняя	1 шт.
– Прогон средний передний	1 шт.
– Прогон нижний передний	1 шт.
– Заглушка крышки	2 шт.
– Заглушка под ограничитель	1 шт.
– Полка ЛДСП нижняя	1 шт.
– Полка ЛДСП	2 шт.
– Полка пластиковая	3 шт.
– Дверь нижняя	1 шт.
– Стеклянная дверь	2 шт.
– Опора	4 шт.
– Накладка для магнитной защёлки	2 шт.
– Петля	4 шт.
– Ручка стеклянных дверей	2 шт.
– Полкодержатель	20 шт.
– Заглушка декоративная	1 шт.
– Площадка магнитной защёлки	2 шт.
– Саморез 3x16	8 шт.
– Магнитная защёлка	2 шт.
– Саморез 3x12	12 шт.
– Ограничитель стеклянных дверей	1 шт.
– Площадка магнитная	1 шт.
– Магнит	1 шт.
– Упор замка	1 шт.
– Заглушка двери нижней	4 шт.
– Петля двери нижней	4 шт.
– Штифт для петель	2 шт.
– Ответная планка магнита	1 шт.
– Саморез 2,9x13	1 шт.
– Ручка двери нижней	1 шт.
– Винт полусфера с прессшайбой М4х14	2 шт.
– Ключ шестигранный малый	1 шт.
– Ключ шестигранный большой	1 шт.
– Логотип компании	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПин 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкафы медицинские ГИКС 942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский лабораторный (мод.2) вариант поставки I	☐ Цвет белый	XXXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25


Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

ЕЛАМЕД

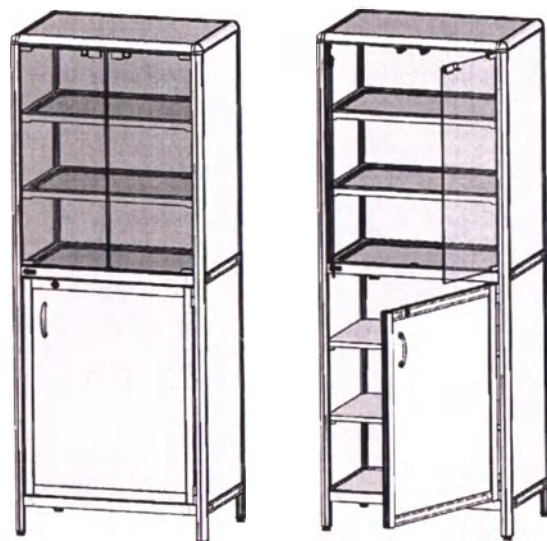

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
(мод.2)
вариант поставки 2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.162-01 РЭ

Шкаф медицинский лабораторный (мод.2) вариант поставки 2 (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться на шкаф и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 27,1±2,7 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (649x449x1643)± 4.

Габаритный размер изделия по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку полимерную – 10 кг;

- на полку из плиты, ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры в виде подсадных ножек в диапазоне не менее 5 мм. Толщина стеклянной двери – 4 мм.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из алюминиевого профиля с заполнением стенок сэндвич-панелью. Шкаф разделен на 2 равные секции. В верхней секции расположены 3 пластиковые съемные полки, из которых 2 верхние полки регулируются по высоте установки. В нижней секции расположены 3 съемные полки из ЛДСП, из которых 2 верхние полки регулируются по высоте установки. Верхняя секция закрывается 2-мя стеклянными дверцами со средней степенью тонировки. Двери фиксируются магнитами. Нижняя секция закрывается дверью из алюминиевого профиля с заполнением сэндвич-панелью. Нижняя дверь фиксируется магнитом и замком. Шкаф устанавливается на 4 мебельные ножки. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский лабораторный мод. 2, вариант поставки 2	
• Шкаф медицинский лабораторный мод. 2, вариант поставки 2 – 1 компл., в составе:	
– Крышка	1 шт.
– Стенка левая	1 шт.
– Стенка правая	1 шт.
– Стенка задняя верхняя	1 шт.
– Прогон задний	1 шт.
– Стенка задняя нижняя	1 шт.
– Прогон средний передний	1 шт.
– Прогон нижний передний	1 шт.
– Заглушка крышки	2 шт.
– Заглушка под ограничитель	1 шт.
– Полка ЛДСП нижняя	1 шт.
– Полка ЛДСП	2 шт.
– Полка пластиковая	3 шт.
– Дверь нижняя	1 шт.
– Стеклянная дверь	2 шт.
– Опора	4 шт.
– Накладка для магнитной защёлки	2 шт.
– Петля	4 шт.
– Ручка стеклянных дверей	2 шт.
– Поддержатель	20 шт.
– Заглушка декоративная	1 шт.
– Площадка магнитной защёлки	2 шт.
– Саморез 3x16	8 шт.
– Магнитная защёлка	2 шт.
– Саморез 3x12	12 шт.
– Ограничитель стеклянных дверей	1 шт.
– Площадка магнитная	1 шт.
– Магнит	1 шт.
– Упор замка	1 шт.
– Заглушка двери нижней	4 шт.
– Петля двери нижней	4 шт.
– Штифт для петли	2 шт.
– Ответная планка магнита	1 шт.
– Саморез 2.9x13	1 шт.
– Ручка двери нижней	1 шт.
– Винт полушара с прессшайбой M4x14	2 шт.
– Ключ шестигранный малый	1 шт.
– Ключ шестигранный большой	1 шт.
– Логотип компании	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

- 4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.
- 4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).
- 4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа:

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функций устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкафы медицинские ГИК 942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский лабораторный (мод.2) вариант поставки 2	☐ Цвет белый	XXXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИК.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25


Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

 **ЕЛАМЕД**

Регистрационное удостоверение

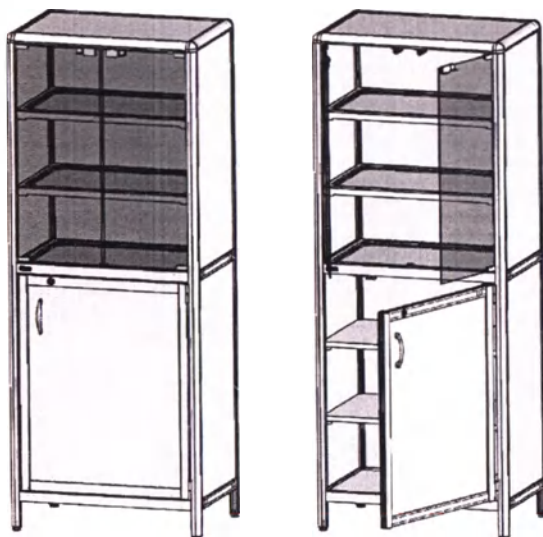

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ (мод.2)

вариант поставки 3

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.162-02 РЭ

ОМ 29.444.06 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский лабораторный (мод.2) вариант поставки 3 (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, лекарственных препаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ оплохиваться на шкаф и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 27,1±2,7 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (649х449х1643)± 4.

Габаритный размер изделия по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку полимерную – 10 кг;

- на полку из плиты, ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры в виде подсадных ножек в диапазоне не менее 5 мм. Толщина стеклянной двери – 4 мм.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из алюминиевого профиля с заполнением стенок сэндвич-панелью. Шкаф разделен на 2 равные секции. В верхней секции расположены 3 пластиковые съемные полки, из которых 2 верхние полки регулируются по высоте установки. В нижней секции расположены 3 съемные полки из ЛДСП, из которых 2 верхние полки регулируются по высоте установки. Верхняя секция закрывается 2-мя стеклянными дверями с сильной степенью тонировки. Двери фиксируются магнитами. Нижняя секция закрывается дверью из алюминиевого профиля с заполнением сэндвич-панелью. Нижняя дверь фиксируется магнитом и замком. Шкаф устанавливается на 4 мебельные ножки. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский лабораторный мод. 2, вариант поставки 3	
• Шкаф медицинский лабораторный мод. 2, вариант поставки 3 - 1 компл., в составе:	
— Крышка	1 шт.
— Стенка левая	1 шт.
— Стенка правая	1 шт.
— Стенка задняя верхняя	1 шт.
— Прогон задний	1 шт.
— Стенка задняя нижняя	1 шт.
— Прогон средний передний	1 шт.
— Прогон нижний передний	1 шт.
— Заглушка крышки	2 шт.
— Заглушка под ограничитель	1 шт.
— Полка ЛДСП нижняя	1 шт.
— Полка ЛДСП	2 шт.
— Полка пластиковая	3 шт.
— Дверь нижняя	1 шт.
— Стеклянная дверь	2 шт.
— Опора	4 шт.
— Накладка для магнитной защелки	2 шт.
— Петля	4 шт.
— Ручка стеклянных дверей	2 шт.
— Полкодержатель	20 шт.
— Заглушка декоративная	1 шт.
— Площадка магнитной защелки	2 шт.
— Саморез 3x16	8 шт.
— Магнитная защелка	2 шт.
— Саморез 3x12	12 шт.
— Ограничитель стеклянных дверей	1 шт.
— Площадка магнитная	1 шт.
— Магнит	1 шт.
— Упор замка	1 шт.
— Заглушка двери нижней	4 шт.
— Петля двери нижней	4 шт.
— Штифт для петли	2 шт.
— Ответная планка магнита	1 шт.
— Саморез 2,9x13	1 шт.
— Ручка двери нижней	1 шт.
— Винт полусфера с прессшайбой М4х14	2 шт.
— Ключ шестигранный малый	1 шт.
— Ключ шестигранный большой	1 шт.
— Логотип компании	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкафа соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПин 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский лабораторный (мод.2) вариант поставки 3	☐ Цвет белый	XXXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25


Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение



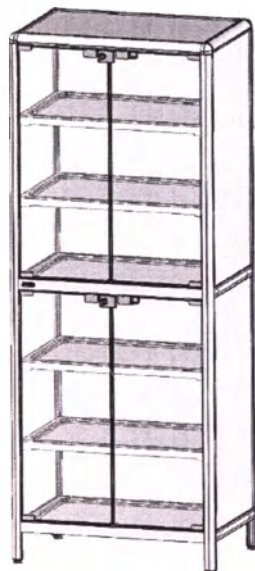

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ (мод.3) вариант поставки 1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.184 РЭ

ОМ 29.446.05 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский лабораторный (мод.3) вариант поставки 1 (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться на шкаф и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 25,2±2,5 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (649х445х1643)±4.

Габаритный размер изделия по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку полимерную – 10 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры в виде подседных ножек в диапазоне не менее 5 мм. Толщина стеклянной дверцы – 4 мм.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из алюминиевого профиля с заполнением стенок сэндвич-панелью. Шкаф разделен на 2 равные секции, внутри каждой секции расположены по 3 пластиковые съемные полки. В каждой из секций 2 верхние полки регулируются по высоте установки. Верхняя и нижняя секции закрываются каждая индивидуально 2-мя прозрачными стеклянными дверцами с фиксации магнитами и индивидуальным замком. Шкаф устанавливается на 4 мебельные ножки. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский лабораторный мод. 3, вариант поставки 1	
• Шкаф медицинский лабораторный мод. 3, вариант поставки 1 - 1 компл., в составе:	
— Крышка	1 шт.
— Стенка левая	1 шт.
— Стенка правая	1 шт.
— Стенка задняя верхняя	1 шт.
— Прогон задний	2 шт.
— Стенка задняя нижняя	1 шт.
— Прогон средний передний	1 шт.
— Прогон нижний передний	1 шт.
— Заглушка левая прогона и крышки	2 шт.
— Заглушка правая прогона и крышки	2 шт.
— Заглушка под замок	2 шт.
— Заглушка под ограничитель	2 шт.
— Полка пластиковая	6 шт.
— Стеклянная дверца	4 шт.
— Опора	4 шт.
— Накладка для магнитной защёлки	4 шт.
— Замок	2 шт.
— Петля	8 шт.
— Ручка стеклянных дверей	2 шт.
— Полкодержатель	24 шт.
— Заглушка декоративная	1 шт.
— Площадка магнита	4 шт.
— Саморез 3х16	8 шт.
— Магнит	4 шт.
— Саморез 3х12	10 шт.
— Ограничитель стеклянных дверей	2 шт.
— Ключ шестигранный малый	1 шт.
— Ключ шестигранный большой	1 шт.
— Логотип компании	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждениях составных частей изделия обратиться к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкафа соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский лабораторный (мод.3) вариант поставки 1 изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Код

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25




Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: ipri@elamed.com

Сайт компании: ipri.elamed.com

Регистрационное удостоверение

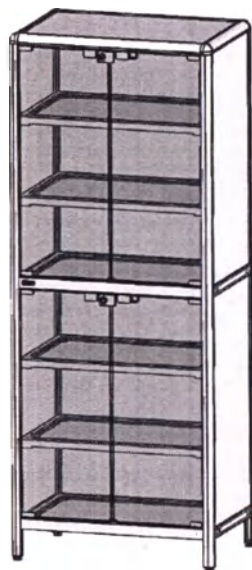

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ (мод.3) вариант поставки 2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.184-01 РЭ

ОМ 29.447.05 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский лабораторный (мод.3) вариант поставки 2 (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, лекарственных препаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться на шкаф и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 25,2±2,5 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (649х445х1643)±4.

Габаритный размер изделия по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку полимерную – 10 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры в виде подсадных ножек в диапазоне не менее 5 мм. Толщина стеклянной двери – 4 мм.

2.4 При эксплуатации шкафа устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из алюминиевого профиля с заполнением стенок сэндвич-панелью. Шкаф разделен на 2 равные секции, внутри каждой секции расположены по 3 пластиковые съемные полки. В каждой секции 2 верхние полки регулируются по высоте установки. Верхняя и нижняя секции закрываются каждая индивидуально 2-мя стеклянными дверцами со средней степенью тонировки. Двери фиксируются магнитами и индивидуальным замком. Шкафу устанавливается на 4 мебельные ножки. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский лабораторный мод. 3, вариант поставки 2	
• Шкаф медицинский лабораторный мод. 3, вариант поставки 2 - 1 компл., в составе:	
— Крышка	1 шт.
— Стенка левая	1 шт.
— Стенка правая	1 шт.
— Стенка задняя верхняя	1 шт.
— Прогон задний	2 шт.
— Стенка задняя нижняя	1 шт.
— Прогон средний передний	1 шт.
— Прогон нижний передний	1 шт.
— Заглушка левая прогона и крышки	2 шт.
— Заглушка правая прогона и крышки	2 шт.
— Заглушка под замок	2 шт.
— Заглушка под ограничитель	2 шт.
— Полка пластиковая	6 шт.
— Стеклянная дверь	4 шт.
— Опора	4 шт.
— Накладка для магнитной защёлки	4 шт.
— Замок	2 шт.
— Петля	8 шт.
— Ручка стеклянных дверей	2 шт.
— Полкодержатель	24 шт.
— Заглушка декоративная	1 шт.
— Площадка магнита	4 шт.
— Саморез 3x16	8 шт.
— Магнит	4 шт.
— Саморез 3x12	10 шт.
— Ограничитель стеклянных дверей	2 шт.
— Ключ шестигранный малый	1 шт.
— Ключ шестигранный большой	1 шт.
— Логотип компании	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при поврежденных составных частях изделия обратиться к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский лабораторный (мод.3) вариант поставки 2 изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Код

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25




Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: ipu@elamed.com

Сайт компании: ipu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

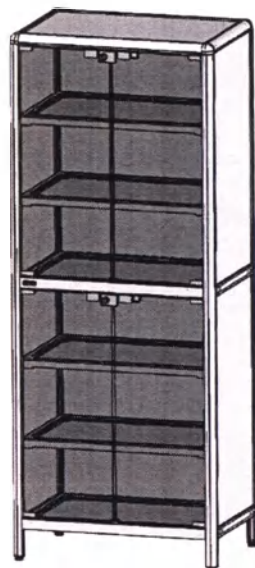

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ (мод.3) вариант поставки 3

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.184-02 РЭ

ОМ 29.448.06 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский лабораторный (мод.3) вариант поставки 3 (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, фирмпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться на шкаф и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 25,2±2,5 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (649х445х1643)± 4.

Габаритный размер изделия по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку полимерную – 10 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры в виде подсадных ножек в диапазоне не менее 5 мм. Толщина стеклянной дверцы – 4 мм.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из алюминиевого профиля с заполнением стенок сэндвич-панелью. Шкаф разделен на 2 равные секции, внутри каждой секции расположены по 3 пластиковые съемные полки. В каждой секции 2 верхние полки регулируются по высоте установки. Верхняя и нижняя секции закрываются каждая индивидуально 2-мя стеклянными дверцами с высокой степенью тонировки. Дверцы фиксируются магнитами и индивидуальным замком. Шкаф устанавливается на 4 мебельные ножки. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский лабораторный мод. 3, вариант поставки 3	
• Шкаф медицинский лабораторный мод. 3, вариант поставки 3 - 1 компл., в составе:	
— Крышка	1 шт.
— Стенка левая	1 шт.
— Стенка правая	1 шт.
— Стенка задняя верхняя	1 шт.
— Прогон задний	2 шт.
— Стенка задняя нижняя	1 шт.
— Прогон средний передний	1 шт.
— Прогон нижний передний	1 шт.
— Заглушка левая прогона и крышки	2 шт.
— Заглушка правая прогона и крышки	2 шт.
— Заглушка под замок	2 шт.
— Заглушка под ограничитель	2 шт.
— Полка пластиковая	6 шт.
— Стеклянная дверца	4 шт.
— Опора	4 шт.
— Накладка для магнитной защёлки	4 шт.
— Замок	2 шт.
— Петля	8 шт.
— Ручка стеклянных дверей	2 шт.
— Полкодержатель	24 шт.
— Заглушка декоративная	1 шт.
— Площадка магнита	4 шт.
— Саморез 3x16	8 шт.
— Магнит	4 шт.
— Саморез 3x12	10 шт.
— Ограничитель стеклянных дверей	2 шт.
— Ключ шестигранный малый	1 шт.
— Ключ шестигранный большой	1 шт.
— Логотип компании	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкафа соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей* либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приеме

Шкаф медицинский лабораторный (мод.3) вариант поставки 3 изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Код

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25


Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: ipri@elamed.com

Сайт компании: ru.elamed.com

 **ЕЛАМЕД**

Регистрационное удостоверение

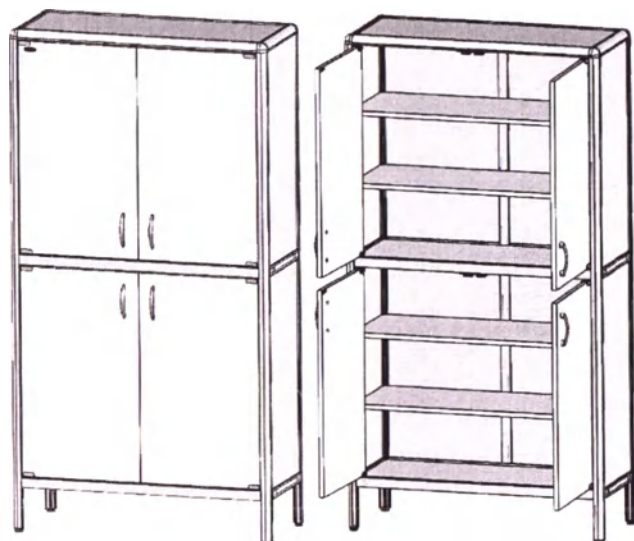

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
(мод.4)РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.192 РЭ

ОМ 29.740.04 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский лабораторный (мод.4) (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лаборатории) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться на шкаф и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 46,5±4,7 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (900х400х1700)±4.

Габаритный размер изделия по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры в виде подсадных ножек в диапазоне не менее 5 мм.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из алюминиевого профиля с заполнением стенок сэндвич-панелью. Шкаф разделен на 2 равные секции. В верхней секции расположены 3 съёмные полки из влагостойкой ЛДСП, из которых 2 верхние полки регулируются по высоте установки. В нижней секции расположены 3 съёмные полки из влагостойкой ЛДСП, из которых 2 верхние полки регулируются по высоте установки. Верхняя и нижняя секции закрываются каждая индивидуально 2-мя дверьми из влагостойкой ЛДСП с фиксацией магнитами. Шкаф устанавливается на 4 мебельные ножки. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский лабораторный мод. 4	
• Шкаф медицинский лабораторный мод. 4 - 1 компл., в составе:	
— Крышка	1 шт.
— Стенка левая	1 шт.
— Стенка правая	1 шт.
— Стенка задняя	3 шт.
— Стенка задняя с этикеткой	1 шт.
— Прогон задний вертикальный	1 шт.
— Прогон передний средний	1 шт.
— Прогон передний нижний	1 шт.
— Заглушка декоративная крышки боковая	4 шт.
— Заглушка декоративная прогона среднего/нижнего	2 шт.
— Прогон задний нижний	1 шт.
— Прогон задний средний	2 шт.
— Дно/полка средняя	2 шт.
— Полка	4 шт.
— Дверь левая нижняя	1 шт.
— Дверь правая нижняя	1 шт.
— Дверь левая верхняя	1 шт.
— Дверь правая верхняя	1 шт.
— Опора	4 шт.
— Петля для дверей из ЛДСП	4 комплекта.
— Ответная планка магнита	4 шт.
— Ручка мебельная	4 комплекта.
— Саморез 3х12	12 шт.
— Полкодержатель	16 шт.
— Заглушка декоративная	1 шт.
— Площадка магнита	4 шт.
— Саморез 3х16	8 шт.
— Защёлка магнитная	4 шт.
— Логотип компании	1 шт.
— Ключ шестигранный малый	1 шт.
— Ключ шестигранный большой	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

ОМ 29.740.04 от 01.08.2023 г.

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепежные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский лабораторный (мод.4)	☐ Цвет белый	XXXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25


 **ЕЛАМЕД**

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

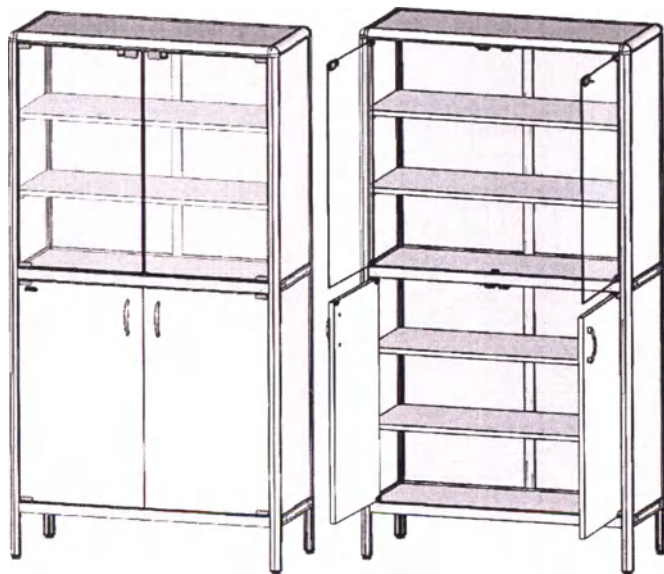

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ (мод.5)

вариант поставки 1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.193 РЭ

ОМ 29.742.04 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский лабораторный (мод.5) вариант поставки 1 (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться на шкаф и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 45,2±4,5 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (900х400х1700)±4.

Габаритный размер изделия по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты, ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры в виде подсальных ножек в диапазоне не менее 5 мм. Толщина стеклянной дверцы – 4 мм.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из алюминиевого профиля с заполнением стенок сэндвич-панелью. Шкаф разделен на 2 равные секции. В верхней секции расположены 3 съёмные полки из влагостойкой ЛДСП, из которых 2 верхние полки регулируются по высоте установки. В нижней секции расположены 3 съёмные полки из влагостойкой ЛДСП, из которых 2 верхние полки регулируются по высоте установки. Верхняя и нижняя секции закрываются каждая индивидуально: верхняя закрывается 2-мя прозрачными стеклянными дверцами с фиксацией магнитами, нижняя - 2-мя дверьми из влагостойкой ЛДСП с фиксацией магнитами. Шкаф устанавливается на 4 мебельные ножки. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
• Шкаф медицинский лабораторный мод. 5, вариант поставки 1 - 1 компл., в составе:	
— Крышка	1 шт.
— Стенка левая	1 шт.
— Стенка правая	1 шт.
— Стенка задняя	3 шт.
— Стенка задняя	1 шт.
— Прогон стенки задней	1 шт.
— Прогон средний передний	1 шт.
— Прогон нижний передний	1 шт.
— Заглушка декоративная крышки боковая	2 шт.
— Заглушка декоративная прогона среднего	2 шт.
— Заглушка под ограничитель	1 шт.
— Заглушка декоративная прогона нижнего	1 шт.
— Прогон задний	2 шт.
— Прогон задний нижний	1 шт.
— Стеклянная дверца	2 шт.
— Дверь левая нижняя	1 шт.
— Дверь правая нижняя	1 шт.
— Дно/полка средняя	2 шт.
— Полка	2 шт.
— Полка верхняя	2 шт.
— Опора	4 шт.
— Накладка для магнитной защелки	2 шт.
— Ограничитель стеклянных дверей	1 шт.
— Петля для стеклянных дверей	2 комплекта.
— Ручка стеклянных дверей	2 шт.
— Полкодержатель	16 шт.
— Заглушка декоративная	1 шт.
— Площадка магнита	4 шт.
— Саморез 3х16	8 шт.
— Защелка магнитная	4 шт.
— Саморез 3х12	10 шт.
— Ручка мебельная	2 комплекта.
— Ответная планка магнита	2 шт.
— Петля для дверей из ЛДСП	2 комплекта.
— Логотип компании	1 шт.
— Ключ шестигранный малый	1 шт.
— Ключ шестигранный большой	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройства, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский лабораторный (мод.5) вариант поставки I	☐ Цвет белый	XXXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25


Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

ЕЛАМЕД

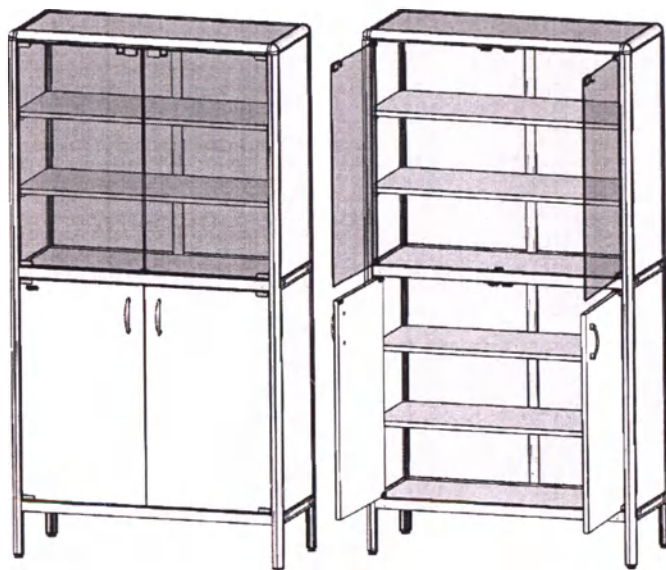

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
(мод.5)
вариант поставки 2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.193-01 РЭ

ОМ 29.743.04 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский лабораторный (мод.5) вариант поставки 2 (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лаборатории) для размещения медицинских изделий, фарм-препаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться на шкаф и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 45,2±4,5 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (900х400х1700)±4.

Габаритный размер изделия по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры в виде подсадных ножек в диапазоне не менее 5 мм. Толщина стеклянной дверцы – 4 мм.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из алюминиевого профиля с заполнением стенок сэндвич-панелью. Шкаф разделен на 2 равные секции. В верхней секции расположены 3 съемные полки из влагостойкой ЛДСП, из которых 2 верхние полки регулируются по высоте установки. В нижней секции расположены 3 съемные полки из влагостойкой ЛДСП, из которых 2 верхние полки регулируются по высоте установки. Верхняя и нижняя секции закрываются каждая индивидуально: верхняя закрывается 2-мя стеклянными дверцами со средней степенью тонировки с фиксацией магнитами, нижняя – 2-мя дверями из влагостойкой ЛДСП с фиксацией магнитами. Шкаф устанавливается на 4 мебельные ножки. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
• Шкаф медицинский лабораторный мод. 5, вариант поставки 2 – 1 компл., в составе:	
– Крышка	1 шт.
– Стенка левая	1 шт.
– Стенка правая	1 шт.
– Стенка задняя	3 шт.
– Стенка задняя	1 шт.
– Прогон стенки задней	1 шт.
– Прогон средний передний	1 шт.
– Прогон нижний передний	1 шт.
– Заглушка декоративная крышки боковая	2 шт.
– Заглушка декоративная прогона среднего	2 шт.
– Заглушка под ограничитель	1 шт.
– Заглушка декоративная прогона нижнего	1 шт.
– Прогон задний	2 шт.
– Прогон задний нижний	1 шт.
– Стеклянная дверца	2 шт.
– Дверь левая нижняя	1 шт.
– Дверь правая нижняя	1 шт.
– Дно/полка средняя	2 шт.
– Полка	2 шт.
– Полка верхняя	2 шт.
– Опора	4 шт.
– Накладка для магнитной защелки	2 шт.
– Ограничитель стеклянных дверей	1 шт.
– Петля для стеклянных дверей	2 комплекта.
– Ручка стеклянных дверей	2 шт.
– Полкодержатель	16 шт.
– Заглушка декоративная	1 шт.
– Площадка магнита	4 шт.
– Саморез 3x16	8 шт.
– Защелка магнитная	4 шт.
– Саморез 3x12	10 шт.
– Ручка мебельная	2 комплекта.
– Ответная планка магнита	2 шт.
– Петля для дверей из ЛДСП	2 комплекта.
– Логотип компании	1 шт.
– Ключ шестигранный малый	1 шт.
– Ключ шестигранный большой	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждениях составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеназженных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский лабораторный (мод.5) вариант поставки 2	☐ Цвет белый	XXXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25


Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

 **ЕЛАМЕД**

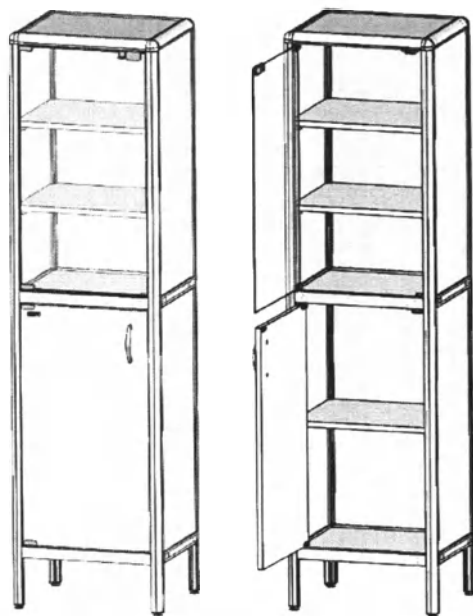

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
(мод.6)
вариант поставки 1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.194 РЭ

ОМ 29.745.04 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский лабораторный (мод.6) вариант поставки 1 (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лаборатории) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться на шкаф и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 23±2,3 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (450x400x1700)±4.

Габаритный размер изделия по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты, ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры в виде подсадных ножек в диапазоне не менее 5 мм. Толщина стеклянной дверцы – 4 мм.

2.4 При эксплуатации шкафа устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из алюминиевого профиля с заполнением стенок сэндвич-панелью. Шкаф разделен на 2 равные секции. В верхней секции расположены 3 съёмные полки из влагостойкой ЛДСП, из которых 2 верхние полки регулируются по высоте установки. В нижней секции расположены 2 съёмные полки из влагостойкой ЛДСП, верхняя из которых регулируется по высоте установки. Верхняя и нижняя секции закрываются каждая индивидуально: верхняя закрывается прозрачной стеклянной дверцей с фиксацией магнитом, нижняя - дверью из влагостойкой ЛДСП с фиксацией магнитом. Шкаф устанавливается на 4 мебельные ножки. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский лабораторный мод. 6, вариант поставки 1	
• Шкаф медицинский лабораторный мод. 6, вариант поставки 1 - 1 компл., в составе:	
— Крышка	1 шт.
— Стенка левая	1 шт.
— Стенка правая	1 шт.
— Стенка задняя верхняя	1 шт.
— Прогон задний	2 шт.
— Стенка задняя нижняя	1 шт.
— Прогон средний передний	1 шт.
— Прогон нижний передний	1 шт.
— Заглушка прогона	1 шт.
— Заглушка правая крышки	1 шт.
— Заглушка левая крышки	1 шт.
— Заглушка под ограничитель	1 шт.
— Стеклянная дверца	1 шт.
— Дверь левая нижняя	1 шт.
— Дно/полка средняя	2 шт.
— Полка	1 шт.
— Полка верхняя	2 шт.
— Заглушка нижняя	1 шт.
— Опора	4 шт.
— Накладка для магнитной защелки	1 шт.
— Петля для дверки ЛДСП	1 комплект.
— Петля для стеклянной двери	1 комплект.
— Ручка стеклянной двери	1 шт.
— Полкодержатель	12 шт.
— Заглушка декоративная	1 шт.
— Площадка магнита	4 шт.
— Саморез 3x16	4 шт.
— Защелка магнитная	2 шт.
— Саморез 3x12	5 шт.
— Ограничитель стеклянных дверей	1 шт.
— Ручка мебельная	1 комплект.
— Ответная планка магнита	1 шт.
— Логотип компании	1 шт.
— Ключ шестигранный малый	1 шт.
— Ключ шестигранный большой	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

ОМ 29.745.04 от 01.08.2023 г.

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при поврежденных составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функций устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский лабораторный (мод.6) вариант поставки I	☐ Цвет белый	XXXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

ОМ 29.745.04 от 01.08.2023 г.

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25


Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

ЕЛАМЕД

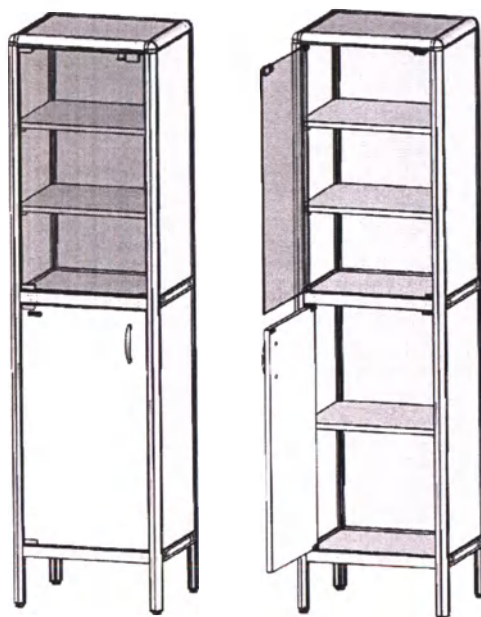

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ (мод.6)

вариант поставки 2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.194-01 РЗ

ОМ 29.746.04 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский лабораторный (мод.6) вариант поставки 2 (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, фарм-препаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться на шкаф и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия $23 \pm 2,3$ кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: $(450 \times 400 \times 1700) \pm 4$.

Габаритный размер изделия по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты, ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры в виде подсадных ножек в диапазоне не менее 5 мм. Толщина стеклянной дверцы – 4 мм.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из алюминиевого профиля с заполнением стенок сэндвич-панелью. Шкаф разделен на 2 равные секции. В верхней секции расположены 3 съёмные полки из влагостойкой ЛДСП, из которых 2 верхние полки регулируются по высоте установки. В нижней секции расположены 2 съёмные полки из влагостойкой ЛДСП, верхняя из которых регулируется по высоте установки. Верхняя и нижняя секции закрываются каждая индивидуально: верхняя закрывается стеклянной дверцей со средней степенью тонировки с фиксацией магнитом, нижняя - дверью из влагостойкой ЛДСП с фиксацией магнитом. Шкаф устанавливается на 4 мебельные ножки. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский лабораторный мод. 6, вариант поставки 2	
• Шкаф медицинский лабораторный мод. 6, вариант поставки 2 - 1 компл., в составе:	
— Крышка	1 шт.
— Стенка левая	1 шт.
— Стенка правая	1 шт.
— Стенка задняя верхняя	1 шт.
— Прогон задний	2 шт.
— Стенка задняя нижняя	1 шт.
— Прогон средний передний	1 шт.
— Прогон нижний передний	1 шт.
— Заглушка прогона	1 шт.
— Заглушка правая крышки	1 шт.
— Заглушка левая крышки	1 шт.
— Заглушка под ограничитель	1 шт.
— Стеклянная дверца	1 шт.
— Дверь левая нижняя	1 шт.
— Дно/полка средняя	2 шт.
— Полка	1 шт.
— Полка верхняя	2 шт.
— Заглушка нижняя	1 шт.
— Опора	4 шт.
— Накладка для магнитной защелки	1 шт.
— Петля для двери ЛДСП	1 комплект.
— Петля для стеклянной двери	1 комплект.
— Ручка стеклянной двери	1 шт.
— Полкодержатель	12 шт.
— Заглушка декоративная	1 шт.
— Пластина магнита	4 шт.
— Саморез 3x16	4 шт.
— Защелка магнитная	2 шт.
— Саморез 3x12	5 шт.
— Ограничитель стеклянных дверей	1 шт.
— Ручка мебельная	1 комплект.
— Ответная планка магнита	1 шт.
— Логотип компании	1 шт.
— Ключ шестигранный малый	1 шт.
— Ключ шестигранный большой	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утверждённым внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функций устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приеме

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский лабораторный (мод.6) вариант поставки 2	☐ Цвет белый	XXXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25




Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

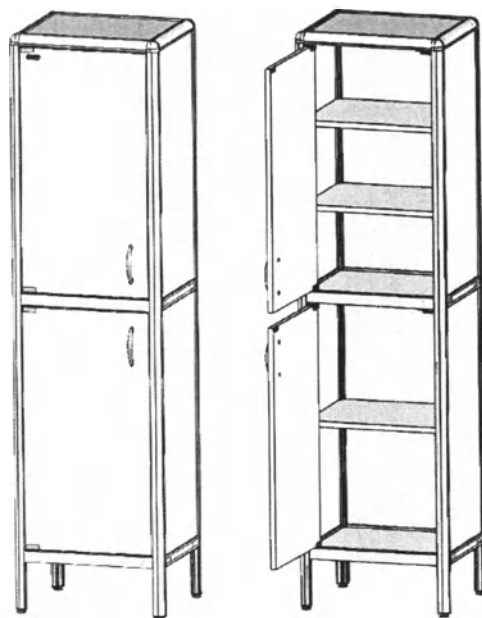

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
(мод.7)РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.195 РЗ

Шкаф медицинский лабораторный (мод.7) (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться на шкаф и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 23,2±2,3 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (450х400х1700)±4.

Габаритный размер изделия по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты, ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры в виде подсадных ножек в диапазоне не менее 5 мм.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из алюминиевого профиля с заполнением стенок сэндвич-панелью. Шкаф разделен на 2 равные секции. В верхней секции расположены 3 съёмные полки из влагостойкой ЛДСП, из которых 2 верхние полки регулируются по высоте установки. В нижней секции расположены 2 съёмные полки из влагостойкой ЛДСП, верхняя из которых регулируется по высоте установки. Верхняя и нижняя секции закрываются каждая индивидуально дверью из влагостойкой ЛДСП с фиксацией магнитом. Шкаф устанавливается на 4 мебельные ножки. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский лабораторный мод. 7	
• Шкаф медицинский лабораторный мод. 7 - 1 компл., в составе:	
- Крышка	1 шт.
- Стенка левая	1 шт.
- Стенка правая	1 шт.
- Стенка задняя верхняя	1 шт.
- Прогон задний	2 шт.
- Стенка задняя нижняя	1 шт.
- Прогон средний передний	1 шт.
- Прогон нижний передний	1 шт.
- Заглушка под магнит	2 шт.
- Заглушка прогона	2 шт.
- Дно/полка средняя	2 шт.
- Полка	3 шт.
- Дверь левая нижняя	1 шт.
- Дверь левая верхняя	1 шт.
- Опора	4 шт.
- Петля для дверей из ЛДСП	2 комплекта.
- Ответная планка магнита	2 шт.
- Ручка мебельная	2 комплекта.
- Саморез 3x12	6 шт.
- Полкодержатель	12 шт.
- Заглушка декоративная	1 шт.
- Площадка магнита	2 шт.
- Саморез 3x16	4 шт.
- Зашелка магнитная	2 шт.
- Логотип компании	1 шт.
- Ключ шестигранный малый	1 шт.
- Ключ шестигранный большой	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

ОМ 29.748.04 от 01.08.2023 г.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждениях составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функций устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приеме

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский лабораторный (мод.7)	☐ Цвет белый	XXXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25




Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: ipu@elamed.com

Сайт компании: ipu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

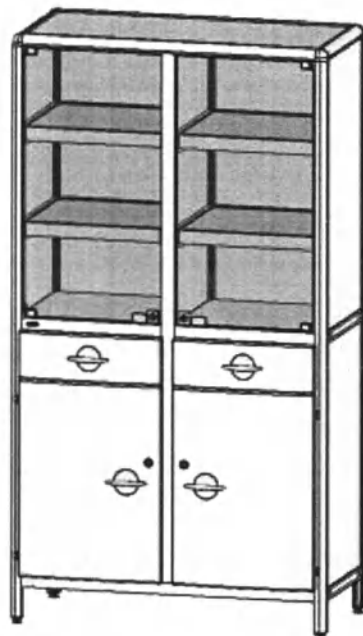

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
(мод.8)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.105-06РЭ

ОМ 29.1203.00 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский лабораторный (мод.8) (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться и надавливать на верхние грани выдвинутых ящиков и открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 35,5±3,5 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (895х472х1652)± 4.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на дно ящика полимерного - 7 кг;

- на полку полимерную - 10 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Усилие выдвигания ящика не должно превышать 5 даН. Шкаф имеет 4 опоры в виде подсадных ножек, регулируемые по высоте.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из алюминиевого профиля с заполнением стенок сэндвич-панелью. Шкаф разделен на 2 секции. Между секциями расположены 2 выдвижных пластиковых ящика. Верхняя секция разделена вертикальной перегородкой на 2 равных отделения, в каждом из которых расположены 3 полки: две верхние – из пластика, регулирующиеся по высоте установки, нижняя – нерегулируемая, из влагостойкой ЛДСП. Нижняя секция разделена вертикальной перегородкой на 2 равные части, в каждой из которых расположены 2 пластиковые полки, верхняя из которых регулируется по высоте. Верхняя и нижняя секции закрываются каждая индивидуально: верхняя закрывается 2-мя стеклянными дверцами со средней степенью тонировки с фиксацией магнитами, нижняя – 2-мя пластиковыми дверьми с индивидуальными замками. Шкаф устанавливается на 4 регулируемые опоры. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский лабораторный мод. 8	
• Шкаф медицинский лабораторный мод. 8 - 1 компл., в составе:	
— Крышка	1 шт.
— Стенка левая	1 шт.
— Стенка правая	1 шт.
— Стойка передняя	1 шт.
— Стойка задняя	1 шт.
— Корпус ящика	2 шт.
— Стенка задняя верхняя	2 шт.
— Стенка задняя нижняя	2 шт.
— Перегородка верхняя	1 шт.
— Перегородка нижняя	1 шт.
— Прогон нижний	2 шт.
— Прогон задний	2 шт.
— Прогон передний левый	1 шт.
— Прогон передний правый	1 шт.
— Прогон центральный	1 шт.
— Стеклодверца	2 шт.
— Дверь левая	1 шт.
— Дверь правая	1 шт.
— Полка пластиковая	8 шт.
— Полка ЛДСП левая	1 шт.
— Полка ЛДСП правая	1 шт.
— Фасад ящика	2 шт.
— Планка магнитная	2 шт.
— Замок	2 шт.
— Саморез 4,5х16	8 шт.
— Винт М4х25	4 шт.
— Винт М4х30	4 шт.
— Заглушка самоклеющаяся	16 шт.
— Саморез 3,5х13	16 шт.
— Опора	4 шт.
— Направляющие	2 комплекта.
— Ручка	4 шт.
— Магнит	2 шт.
— Полкодержатель	24 шт.
— Штифт петли	4 шт.
— Петли для стеклянных дверей	2 комплекта.
— Винт М3х6	8 шт.
— Саморез 3х12	4 шт.
— Ключ шестигранный малый	1 шт.
— Ключ шестигранный большой	1 шт.
— Логотип компании	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

ОМ 29.1203.00 от 01.08.2023 г.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя..

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручки двери не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский лабораторный (мод.8)	☐ Цвет белый	XXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

ОМ 29.1203.00 от 01.08.2023 г.

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25


Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com



Регистрационное удостоверение №

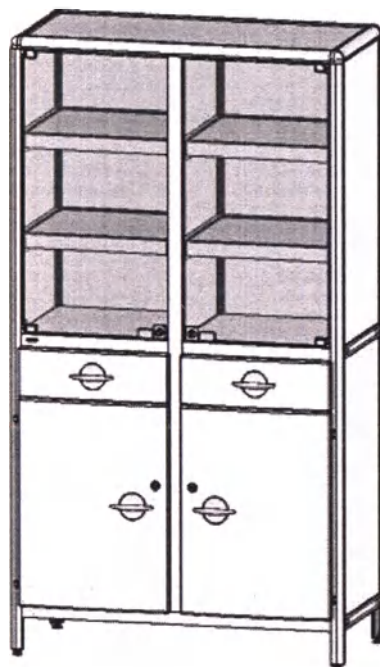

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
(мод.9)РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.105-07РЭ

ОМ 29.1204.00 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский лабораторный (мод.9) (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться и надавливать на верхние грани выдвинутых ящиков и открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 35,5±3,5 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (895x472x1652)± 4.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на дно ящика полимерного - 7 кг;

- на полку полимерную - 10 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Усилие выдвигания ящика не должно превышать 5 даН. Шкаф имеет 4 опоры в виде подсадных ножек, регулируемые по высоте.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из алюминиевого профиля с заполнением стенок сэндвич-панелью. Шкаф разделен на 2 секции. Между секциями расположены 2 выдвижных пластиковых ящика. Верхняя секция разделена вертикальной перегородкой на 2 равных отделения, в каждом из которых расположены 3 полки: две верхние - из пластика, регулирующиеся по высоте установки, нижняя - нерегулируемая, из влагостойкой ЛДСП. Нижняя секция разделена вертикальной перегородкой на 2 равные части, в каждой из которых расположены 2 пластиковые полки, верхняя из которых регулируется по высоте. Верхняя и нижняя секции закрываются каждая индивидуально: верхняя закрывается 2-мя стеклянными дверцами с высокой степенью тонировки с фиксацией магнитами, нижняя - 2-мя пластиковыми дверьми с индивидуальными замками. Шкаф устанавливается на 4 регулируемые опоры. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский лабораторный мод. 9	
• Шкаф медицинский лабораторный мод. 9 - 1 компл., в составе:	
— Крышка	1 шт.
— Стенка левая	1 шт.
— Стенка правая	1 шт.
— Стойка передняя	1 шт.
— Стойка задняя	1 шт.
— Корпус ящика	2 шт.
— Стенка задняя верхняя	2 шт.
— Стенка задняя нижняя	2 шт.
— Перегородка верхняя	1 шт.
— Перегородка нижняя	1 шт.
— Прогон нижний	2 шт.
— Прогон задний	2 шт.
— Прогон передний левый	1 шт.
— Прогон передний правый	1 шт.
— Прогон центральный	1 шт.
— Стеклянные двери	2 шт.
— Дверь левая	1 шт.
— Дверь правая	1 шт.
— Полка пластиковая	8 шт.
— Полка ЛДСП левая	1 шт.
— Полка ЛДСП правая	1 шт.
— Фасад ящика	2 шт.
— Планка магнитная	2 шт.
— Замок	2 шт.
— Саморез 4,5x16	8 шт.
— Винт М4x25	4 шт.
— Винт М4x30	4 шт.
— Заглушка самоклеющаяся	16 шт.
— Саморез 3,5x13	16 шт.
— Опора	4 шт.
— Направляющие	2 комплекта.
— Ручка	4 шт.
— Магнит	2 шт.
— Полкодержатель	24 шт.
— Штифт петли	4 шт.
— Петля для стеклянных дверей	2 комплекта.
— Винт М3x6	8 шт.
— Саморез 3x12	4 шт.
— Ключ шестигранный малый	1 шт.
— Ключ шестигранный большой	1 шт.
— Логотип компании	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя..

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручки двери не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функций устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приеме

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский лабораторный (мод.9)	☐ Цвет белый	XXXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25


Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение №

ЕЛАМЕД

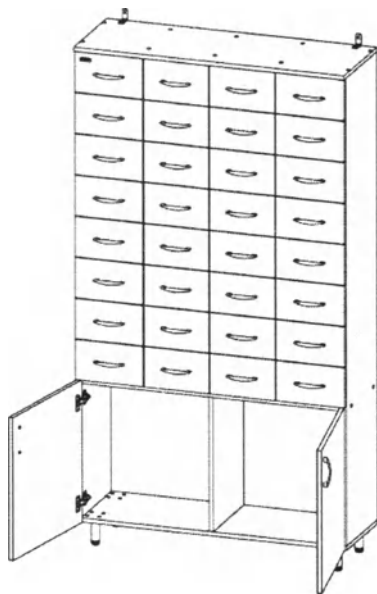

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.198 РЭ

Шкаф медицинский для медикаментов (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергается дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф используется в процедурном, смотровом кабинетах, аптеках, для хранения медикаментов.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться и надавливать на верхние грани выдвинутых ящиков и открытой двери!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 116,6±11,7 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (1040x381x1955)± 4.

Габаритный размер изделия по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на дно ящика из плиты, ламинированной древесноволокнистой – 10 кг

2.3 Усилие выдвигания ящика не более 5 даН. Ящик имеет устройство для предотвращения выпадения при выдвигании. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры в виде подсадных ножек в диапазоне не менее 5 мм.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из ЛДСП. Шкаф состоит из двух секций: верхняя состоит из 32-х выдвигаемых ящиков, глубина каждого ящика – 284 мм. Каждый выдвижной ящик установлен на шариковых направляющих полного выдвижения. Нижняя секция представляет пространство, разделенное вертикальной перегородкой на 2 равные части и закрывающиеся 2 дверцами. Задняя стенка шкафа изготовлена из плиты декоративной древесноволокнистой (ДВП). Шкаф устанавливается на 4 мебельные ножки. Перед эксплуатацией изделие необходимо закрепить к стене. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский для медикаментов	
• Шкаф медицинский для медикаментов - 1 компл., в составе:	
— Стенка левая	1 шт.
— Стенка правая	1 шт.
— Основание	1 шт.
— Полка межсекционная	1 шт.
— Крышка	1 шт.
— Стенка задняя левая	1 шт.
— Стенка задняя правая	1 шт.
— Перегородка нижняя	1 шт.
— Стенка задняя выдвижного ящика	32 шт.
— Стенка левая выдвижного ящика	32 шт.
— Стенка правая выдвижного ящика	32 шт.
— Дно выдвижного ящика	32 шт.
— Фасад левый выдвижного ящика	8 шт.
— Фасад средний выдвижного ящика	16 шт.
— Фасад правый выдвижного ящика	8 шт.
— Дверь левая	1 шт.
— Дверь правая	1 шт.
— Перегородка	3 шт.
— Конфирмат	154 шт.
— Заглушка конфирмата	18 шт.
— Шкант мебельный	155 шт.
— Опора	4 шт.
— Винт М4х25	16 шт.
— Шайба 4 мм	16 шт.
— Гайка М4	16 шт.
— Шток эксцентрика	130 шт.
— Эксцентрик	130 шт.
— Заглушка эксцентрика	128 шт.
— Ручка мебельная	34 комплекта.
— Гвоздь 1,6x25	58 шт.
— Уголок	2 шт.
— Болт М5х25	2 шт.
— Шайба 5 мм	4 шт.
— Гайка М5	2 шт.
— Саморез 3,5x13	448 шт.
— Направляющие шариковые	32 комплекта.
— Петля накладная, монтажная планка	4 комплекта.
— Саморез 4x16	16 шт.
— Саморез с прессшайбой 4,2x14	16 шт.
— Ключ шестигранный 4 мм	1 шт.
— Логотип компании	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

ОМ 29.738.04 от 01.08.2023 г.

4. Транспортирование и хранение

- 4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.
- 4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).
- 4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепежные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.
- 6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.
- Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:
- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;
- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;
- 6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

- 7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.
- 7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки

8. Техническое обслуживание

- Техническое обслуживание шкафа включает в себя:
- поддержание технического состояния шкафа в виде:
 - а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;
 - б) протяжки винтов ручек дверей и ящиков не реже одного раза в месяц;
 - в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;
 - очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
 - дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функций устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приеме

Шафы медицинские ГИКС 942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский для медикаментов	☐ Цвет белый	XXXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

ОМ 29.738.04 от 01.08.2023 г.

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25




Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

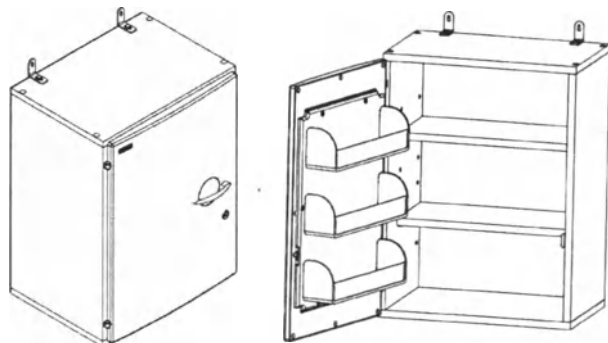

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ НАВЕСНОЙ ДЛЯ ФАРМПРЕПАРАТОВ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.178 РЭ

ОМ 29.480.05 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский навесной для фармпрепаратов (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф используется в процедурном, смотровом кабинетах, аптеках, для хранения фармпрепаратов.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагружать рабочие поверхности полок выше норм, установленных в п. 2.2!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия $15 \pm 1,5$ кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: $(429 \times 351 \times 623) \pm 4$.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг.

- на лоток полимерный – 0,5 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из ЛДСП. Внутри шкафа расположены 2 съёмные полки с возможностью регулировки по высоте установки. Шкаф закрывается пластиковой дверцей с фиксацией на замок. С внутренней стороны дверцы расположена 1 полимерная полка с 3-мя полимерными лотками. Задняя стенка шкафа изготовлена из плиты декоративной древесноволокнистой (ДВП). Перед эксплуатацией изделие необходимо закрепить к стене. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский навесной для фармпрепаратов	
• Шкаф медицинский навесной для фармпрепаратов - 1 компл., в составе:	
— Стенка левая	1 шт.
— Стенка правая	1 шт.
— Основание	1 шт.
— Крышка	1 шт.
— Стенка задняя	1 шт.
— Полка	2 шт.
— Дверь	1 шт.
— Основание навесных полок	1 шт.
— Полка навесная	3 шт.
— Планка навесной полки	3 шт.
— Конфирмат	8 шт.
— Заглушка конфирмата	8 шт.
— Шкант мебельный	4 шт.
— Уголок	2 шт.
— Болт М5х25	2 шт.
— Шайба 5 мм	4 шт.
— Гайка М5	2 шт.
— Подкодержатель	8 шт.
— Заглушка технологических отверстий	16 шт.
— Ручка мебельная	1 шт.
— Винт М4х25	2 шт.
— Гвоздь 1,6х25	20 шт.
— Ответная планка замка	1 шт.
— Саморез 3х12	2 шт.
— Петля ввертная	2 шт.
— Штифт нелл	2 шт.
— Саморез с прессшайбой 4,2х19	2 шт.
— Саморез с прессшайбой 4,2х25	2 шт.
— Ключ шестигранный 4 мм	1 шт.
— Логотип компании	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при поврежденных составных частях изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функций устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский для фармпрепаратов	☐ Цвет белый	XXXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25


 **ЕЛАМЕД**

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

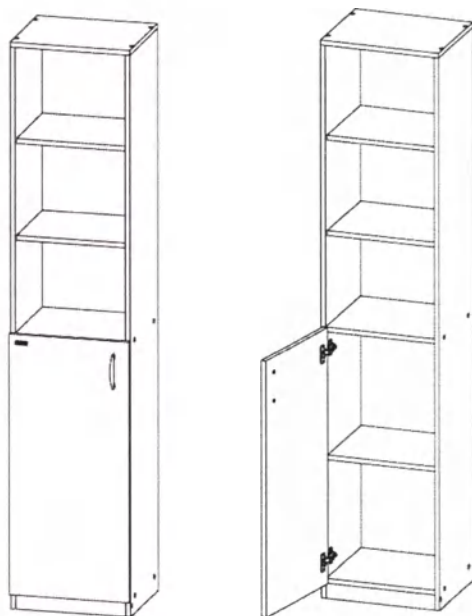

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ (мод.1)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.199 РЗ

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.1) (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или кабинете врача по профилю для размещения медицинских изделий для организации процедур по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и мониторинга состояния организма человека.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться и надавливать на верхние грани открытой двери!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 26,6±2,7 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (400x380x1855)± 4.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты, ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет не регулируемые по высоте опоры в виде подпятников.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из ЛДСП. Шкаф разделен на 2 секции: в верхней секции расположены 2 съёмные полки из ЛДСП, в нижней секции – 1 съёмная полка из ЛДСП. Нижняя секция закрывается дверью из ЛДСП. Задняя стенка изготовлена из плиты декоративной древесноволокнистой (ДВП). Шкаф устанавливается на 4 мебельных подпятника без возможности регулировки по высоте. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.1	
• Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.1 - 1 компл., в составе:	
— Стенка левая	1 шт.
— Стенка правая	1 шт.
— Основание	1 шт.
— Полка межсекционная	1 шт.
— Крышка	1 шт.
— Царга	1 шт.
— Полка	3 шт.
— Стенка задняя	1 шт.
— Дверь	1 шт.
— Конфирмат	14 шт.
— Заглушка конфирмата	14 шт.
— Шкант мебельный	12 шт.
— Поддержатель	12 шт.
— Подпятник мебельный	4 шт.
— Логотип компании	1 шт.
— Петля накладная, монтажная планка	2 комплекта.
— Саморез 4x16	8 шт.
— Гвоздь 1,6x25	57 шт.
— Ручка мебельная, винты с прессшайбой	1 комплект.
— Ключ шестигранный	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;
- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

- а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;
- б) протяжки винтов ручки двери не реже одного раза в месяц;
- в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;
- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функций устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.1)	☐ Цвет белый	XXXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатма, ул. Янина, 25




Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

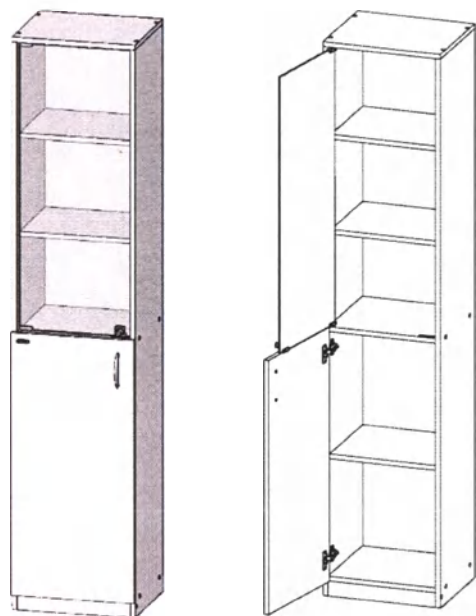

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ (мод.2)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.200 РЭ

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.2) (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или кабинете врача по профилю для размещения медицинских изделий для организации процедур по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и мониторинга состояния организма человека.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 29,3±2,9 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (400x380x1855)±4.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет не регулируемые по высоте опоры в виде подпятников. Толщина стеклянной дверцы – 4 мм.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из ЛДСП. Шкаф разделен на 2 секции: в верхней секции расположены 2 съёмные полки из ЛДСП, в нижней секции – 1 съёмная полка из ЛДСП. Нижняя секция закрывается дверью из ЛДСП. Верхняя секция закрывается прозрачной стеклянной дверцей с фиксацией замком. Задняя стенка изготовлена из плиты декоративной древесноволокнистой (ДВП). Шкаф устанавливается на 4 мебельных подпятника без возможности регулировки по высоте. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.2	
• Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.2	1 компл., в составе:
— Стенка левая	1 шт.
— Стенка правая	1 шт.
— Основание	1 шт.
— Полка межсекционная	1 шт.
— Крышка	1 шт.
— Царга	1 шт.
— Полка	3 шт.
— Стенка задняя	1 шт.
— Дверь	1 шт.
— Стеклянная дверца	1 шт.
— Конфирмат	14 шт.
— Заслушка конфирмата	14 шт.
— Шкант мебельный	12 шт.
— Полкодержатель	12 шт.
— Подпятник мебельный	4 шт.
— Логотип компании	1 шт.
— Петля накладная, монтажная планка	2 комплекта.
— Саморез 4x16	8 шт.
— Гвоздь 1,6x25	57 шт.
— Ручка мебельная, винты с прессшайбой	1 комплект.
— Петля стеклянной дверцы	1 комплект.
— Замок стеклянной дверцы	1 комплект.
— Саморез 3x12	2 шт.
— Ключ шестигранный	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратиться к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

ОМ 29.507.04 от 01.08.2023 г.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии
8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.2)	☐ Цвет белый	XXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатма, ул. Янина, 25


 **ЕЛАМЕД**

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lrp@elamed.com

Сайт компании: lrp.elamed.com

Регистрационное удостоверение

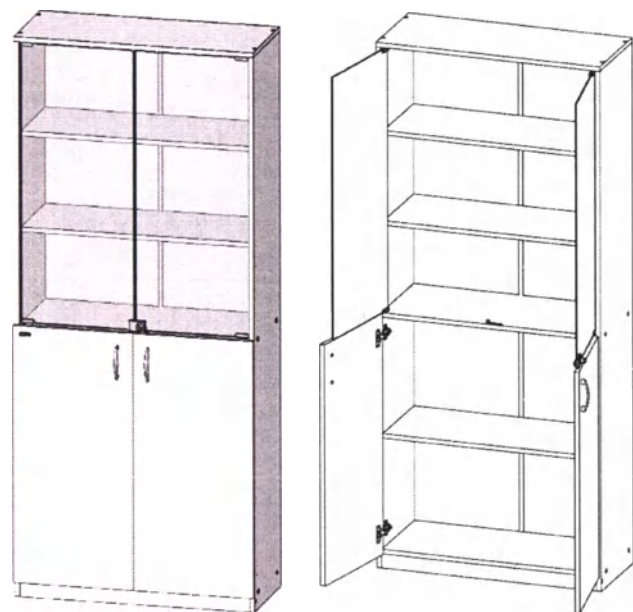

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ (мод.3)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.201 РЭ

ОМ 29.509.04 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.3) (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, лекарственных препаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или кабинете врача по профилю для размещения медицинских изделий для организации процедур по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и мониторинга состояния организма человека.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 46,3±4,6 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (800x382x1855)±4.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет не регулируемые по высоте опоры в виде подпятников. Толщина стеклянной дверцы – 4 мм.

2.4 При эксплуатации шкафа устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из ЛДСП. Шкаф разделен на 2 секции: в верхней секции расположены 2 съемные полки из ЛДСП, в нижней секции – 1 съемная полка из ЛДСП. Нижняя секция закрывается 2-мя дверями из ЛДСП. Верхняя секция закрывается 2-мя прозрачными стеклянными дверцами с фиксацией замком. Задняя стенка изготовлена из плиты декоративной древесноволокнистой (ДВП). Шкаф устанавливается на 4 мебельных подпятника без возможности регулировки по высоте. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.3	
• Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.3 - 1 компл., в составе:	
— Стенка левая	1 шт.
— Стенка правая	1 шт.
— Основание	1 шт.
— Крышка	1 шт.
— Царга	1 шт.
— Полка межсекционная	1 шт.
— Полка верхняя	2 шт.
— Полка нижняя	1 шт.
— Стенка задняя	1 шт.
— Стенка задняя	1 шт.
— Дверь нижняя левая	1 шт.
— Дверь нижняя правая	1 шт.
— Стеклянная дверца левая	1 шт.
— Стеклянная дверца правая	1 шт.
— Конфирмат	14 шт.
— Заглушка конфирмата	14 шт.
— Шкант мебельный	12 шт.
— Полкодержатель	12 шт.
— Подпятник мебельный	4 шт.
— Логотип компании	1 шт.
— Петля накладная, монтажная планка	4 комплекта.
— Саморез 4x16	16 шт.
— Гвоздь 1,6x25	72 шт.
— Брус соединительный	2 комплекта.
— Ручка мебельная, винты с прессшайбой	2 комплекта.
— Петля стеклянной дверцы	2 комплекта.
— Замок стеклянной дверцы	1 комплект.
— Саморез 3x12	2 шт.
— Ключ шестигранный	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждениях составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепежные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.3)	☐ Цвет белый	XXXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25




Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

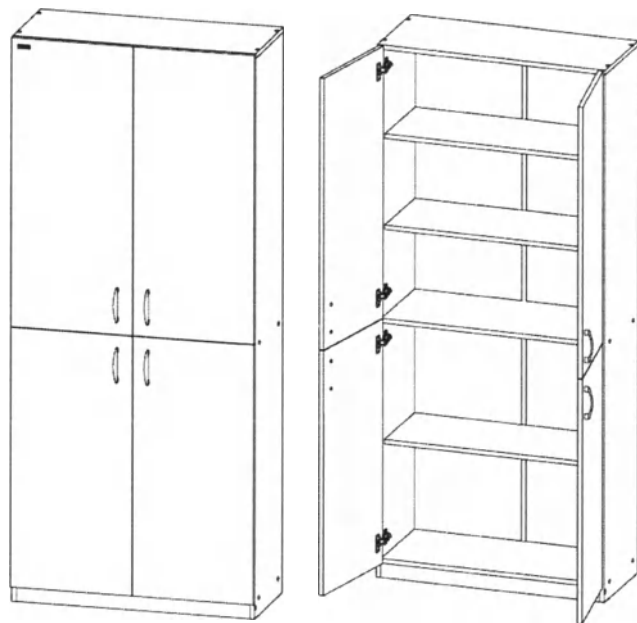

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ (мод.4)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.202 РЭ

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.4) (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или кабинете врача по профилю для размещения медицинских изделий для организации процедур по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и мониторинга состояния организма человека.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 49,3±4,9 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (800x382x1855)±4.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет не регулируемые по высоте опоры в виде подпятников.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из ЛДСП. Шкаф разделен на 2 секции: в верхней секции расположены 2 съёмные полки из ЛДСП, в нижней секции – 1 съёмная полка из ЛДСП. Каждая из секций закрывается индивидуально 2-мя дверьми из ЛДСП. Задняя стенка изготовлена из плиты декоративной древесноволокнистой (ДВП). Шкаф устанавливается на 4 мебельных подпятника без возможности регулировки по высоте. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.4	
• Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.4 - 1 компл., в составе:	
— Стенка левая	1 шт.
— Стенка правая	1 шт.
— Основание	1 шт.
— Крышка	1 шт.
— Царга	1 шт.
— Полка	3 шт.
— Стенка задняя левая	1 шт.
— Стенка задняя правая	1 шт.
— Полка межсекционная	1 шт.
— Дверь нижняя правая	1 шт.
— Дверь нижняя левая	1 шт.
— Дверь верхняя правая	1 шт.
— Дверь верхняя левая	1 шт.
— Конфирмат	14 шт.
— Заглушка конфирмата	14 шт.
— Шкант мебельный	12 шт.
— Полкодержатель	12 шт.
— Подпятник мебельный	4 шт.
— Логотип компании	1 шт.
— Петля накладная, монтажная планка	8 комплекта.
— Саморез 4x16	32 шт.
— Гвоздь 1,6x25	72 шт.
— Ручка мебельная, винты с прессшайбой	4 комплекта.
— Брус соединительный	2 комплекта.
— Ключ шестигранный	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлораминна по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при поврежденных составных частях изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.4)	☐ Цвет белый	XXXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

ЕЛАМЕД

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: ipr@elamed.com

Сайт компании: ipr.elamed.com

Регистрационное удостоверение



ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ (мод.5)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.203 РЭ

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.5) (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или кабинете врача по профилю для размещения медицинских изделий для организации процедур по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и мониторинга состояния организма человека.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 46,7±4,7 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (800х382х1855)± 4.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет не регулируемые по высоте опоры в виде подпятников.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из ЛДСП. Шкаф состоит из 3-х съемных и 1-ой несъемной полки из ЛДСП. Шкаф закрывается 2-мя дверьми из ЛДСП. Задняя стенка шкафа изготовлена из плиты декоративной древесноволокнистой (ДВП). Шкаф устанавливается на 4 мебельных подпятника без возможности регулировки по высоте. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.5	
• Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.5 – 1 компл., в составе:	
– Стенка левая	1 шт.
– Стенка правая	1 шт.
– Основание	1 шт.
– Крышка	1 шт.
– Царга	1 шт.
– Полка	3 шт.
– Стенка задняя левая	1 шт.
– Стенка задняя правая	1 шт.
– Полка межсекционная	1 шт.
– Дверь правая	1 шт.
– Дверь левая	1 шт.
– Конфирмат	14 шт.
– Заглушка конфирмата	14 шт.
– Шкант мебельный	12 шт.
– Полкодержатель	12 шт.
– Подпятник мебельный	4 шт.
– Логотип компании	1 шт.
– Петля накладная, монтажная планка	6 комплекта.
– Саморез 4x16	24 шт.
– Гвоздь 1,6x25	72 шт.
– Ручка мебельная, винты с прессшайбой	2 комплекта.
– Брус соединительный	2 комплекта.
– Ключ шестигранный	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждениях составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.5)	☐ Цвет белый	XXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25




Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

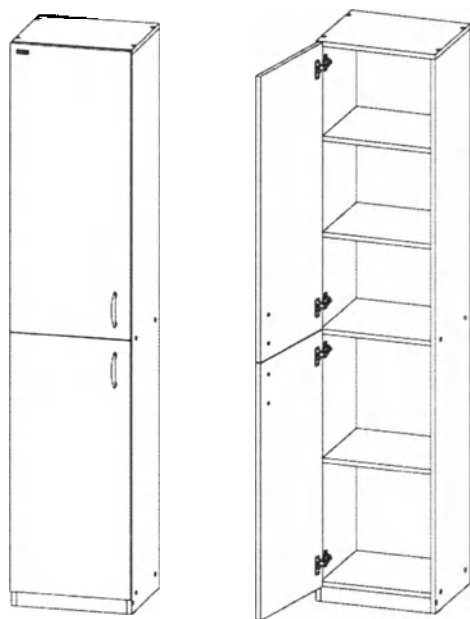

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ (мод.6)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.204 РЗ

ОМ 29.515.04 от 01.06.2023 г.

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.6) (в дальнейшем шкаф), предназначен для размещения в специализированном помещении (процедурном кабинете, операционной, лаборатории) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаться дезинфекционной обработке.

Назначение и применение: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или кабинете врача по профилю для размещения медицинских изделий для организации процедур по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и мониторинга состояния организма человека.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ облоачиваться и наделывать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 30,8±3,1 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (400х380х1855)± 4.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 дН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет не регулируемые по высоте опоры в виде подпятников.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из ЛДСП. Шкаф разделен на 2 секции: в верхней секции расположены 2 съёмные полки из ЛДСП, в нижней секции – 1 съёмная полка из ЛДСП. Каждая из секций закрывается индивидуально дверью из ЛДСП. Задняя стенка шкафа изготовлена из плиты декоративной древесноволокнистой (ДВП). Шкаф устанавливается на 4 мебельных подпятника без возможности регулировки по высоте. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.6	
• Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.6 - 1 комплект, в составе:	
- Стенка левая	1 шт.
- Стенка правая	1 шт.
- Основание	1 шт.
- Полка межсекционная	1 шт.
- Крышка	1 шт.
- Дверь	1 шт.
- Полка	1 шт.
- Стенка задняя	1 шт.
- Дверь нижняя	1 шт.
- Дверь верхняя	1 шт.
- Конфирмат	14 шт.
- Застежка конфирмата	14 шт.
- Шкант мебельный	12 шт.
- Подпятник мебельный	12 шт.
- Подпятник мебельный	4 шт.
- Логотип компании	1 шт.
- Печка вкладная, монтажная плита	4 комплекта
- Саморез 4х16	16 шт.
- Гвоздь 1,6х25	57 шт.
- Ручка мебельная, винты с прессшайбой	2 комплекта
- Ключ конфирматный	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамин по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнений в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатома, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 330-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

ОМ 29.515.04 от 01.08.2023 г.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.6)	☐ Цвет белый	XXXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25




Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

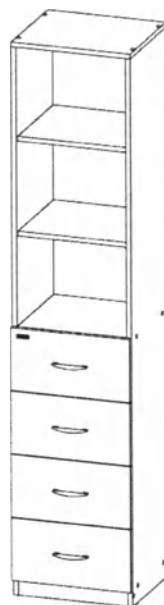

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ (мод.7)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.205 РЗ

ОМ 29.517.04 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.7) (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специализированном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лаборатории) для размещения медицинских изделий, лекарственных препаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Назначение и применение: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или кабинете врача по профилю для размещения медицинских изделий для организации процедур по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и мониторинга состояния организма человека.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться и надавливать на верхние грани выдвинутых ящиков!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 35,7±3,6 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (400х398х1855)±4.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг.

- на дно ящика из плиты ламинированной древесноволокнистой – 10 кг.

2.3 Усилие выдвинутых ящика не должно превышать 5 дН. Ящик должен иметь устройство для предотвращения выпадения при выдвигании. Шкаф имеет не регулируемые по высоте опоры в виде подпятников.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из ЛДСП. Шкаф разделен на 2 секции: в верхней секции расположены 2 съёмные полки из ЛДСП, в нижней секции – 4 выдвижных ящика, глубиной 334 мм каждый. Задняя стенка шкафа изготовлена из плиты декоративной древесноволокнистой (ДВП). Шкаф устанавливается на 4 мебельных подпятника без возможности регулировки по высоте. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителем предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.7	
• Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.7 – 1 компл., в составе:	
– Стенка левая	1 шт.
– Стенка правая	1 шт.
– Крышка	1 шт.
– Основание	1 шт.
– Полка межъящичная	1 шт.
– Полка верхняя	2 шт.
– Царга	1 шт.
– Стенка задняя	1 шт.
– Стенка левая выдвижного ящика	4 шт.
– Стенка правая выдвижного ящика	4 шт.
– Дно выдвижного ящика	4 шт.
– Стенка задняя выдвижного ящика	4 шт.
– Фасад выдвижного ящика	4 шт.
– Конфирмат	30 шт.
– Заглушка конфирмат	14 шт.
– Шпатель мебельный	36 шт.
– Подпорочка	8 шт.
– Подпятник мебельный	4 шт.
– Логотип компании	1 шт.
– Направляющие роликовые	4 комплекта.
– Саморез 3х12	48 шт.
– Гвоздь 1,6х25	55 шт.
– Эксцентрик	8 шт.
– Шток эксцентрика	8 шт.
– Заглушка эксцентрика	8 шт.
– Ручка мебельная, штыль с прессшайбой	4 комплекта.
– Ключ шестигранный	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждениях составных частей изделия обратиться к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.**6.1 Подготовка к работе.**

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее.

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа:

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек ящиков не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приеме

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.7)	☐ Цвет белый	XXXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатма, ул. Янина, 25




Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

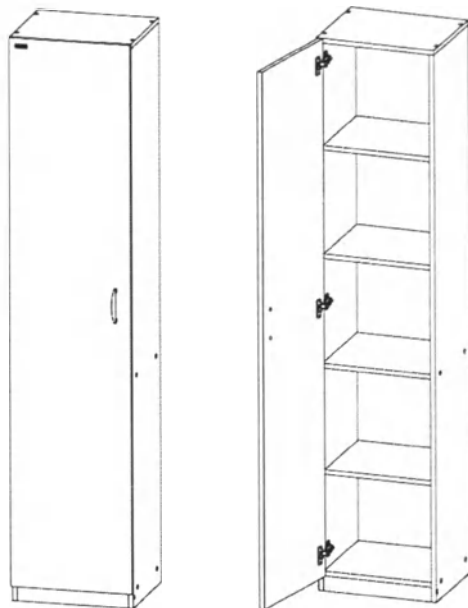

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ (мод.8)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.206 РЭ

ОМ 29.728.04 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.8) (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или кабинете врача по профилю для размещения медицинских изделий для организации процедур по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и мониторинга состояния организма человека.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться и надавливать на верхние грани открытой двери!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 30,6±3,1 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (400x380x1855)±4.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет не регулируемые по высоте опоры в виде подпятников.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из ЛДСП. Внутри шкафа расположены 3 съёмные и 1 несъёмная полки из ЛДСП. Шкаф закрывается дверью из ЛДСП. Задняя стенка шкафа изготовлена из плиты декоративной древесноволокнистой (ДВП). Шкаф устанавливается на 4 мебельных подпятника без возможности регулировки по высоте. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.8	
• Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.8 – 1 компл., в составе:	
– Стенка левая	1 шт.
– Стенка правая	1 шт.
– Основание	1 шт.
– Полка межсекционная	1 шт.
– Крышка	1 шт.
– Царга	1 шт.
– Полка	3 шт.
– Стенка задняя	1 шт.
– Дверь	1 шт.
– Конфирмат	14 шт.
– Заглушка конфирмата	14 шт.
– Шкант мебельный	12 шт.
– Полкодержатель	12 шт.
– Подпятник мебельный	4 шт.
– Логотип компании	1 шт.
– Петля накладная, монтажная планка	3 комплекта.
– Саморез 4x16	12 шт.
– Гвоздь 1,6x25	57 шт.
– Ручка мебельная, винты с прессшайбой	1 комплекта.
– Ключ шестигранный	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;
- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

- а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;
- б) протяжки винтов ручки двери не реже одного раза в месяц;
- в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;
- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.8)	☐ Цвет белый	XXXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Шагмн ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатма, ул. Янина, 25



Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение



ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ (мод.9)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.207 РЭ

ОМ 29.730.04 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.9) (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, лекарственных препаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или кабинете врача по профилю для размещения медицинских изделий для организации процедур по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и мониторинга состояния организма человека.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагружать рабочие поверхности полок выше норм, установленных в п. 2.2!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 25,5±2,6 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (400х382х1855)± 4.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3 Шкаф имеет не регулируемые по высоте опоры в виде подпятников.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из ЛДСП. Внутри шкафа расположены 3 съёмные и 1 несъёмная полки из ЛДСП. Задняя стенка шкафа изготовлена из плиты декоративной древесноволокнистой (ДВП). Шкаф устанавливается на 4 мебельных подпятника без возможности регулировки по высоте. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.9	
• Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.9 – 1 компл., в составе:	
– Стенка левая	1 шт.
– Стенка правая	1 шт.
– Основание	1 шт.
– Полка межсекционная	1 шт.
– Крышка	1 шт.
– Царга	1 шт.
– Полка	3 шт.
– Стенка задняя	1 шт.
– Конфирмат	14 шт.
– Заглушка конфирмата	14 шт.
– Шкант мебельный	12 шт.
– Подкодержатель	12 шт.
– Подпятник мебельный	4 шт.
– Логотип компании	1 шт.
– Гвоздь 1,6х25	57 шт.
– Ключ шестигранный	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.;
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждениях составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Егальма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;
 - скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;
 - подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;
- 6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:
 - а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;
 - б) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;
- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.9) изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ИКС.942810.107 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Код

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25




Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpw@elamed.com

Сайт компании: lpw.elamed.com

Регистрационное удостоверение

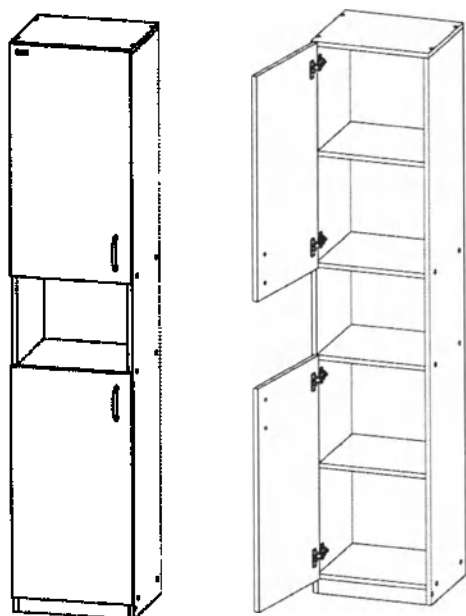

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ (мод.10)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.208 РЗ

ОМ 29.732.04 от 01.06.2023 г.

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.10) (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специализированном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, фармацевтических препаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергается дезинфекционной обработке.

Назначение и применение: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или кабинете врача по профилю для размещения медицинских изделий для организации процедур по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и мониторинга состояния организма человека.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ оплодотворяться и наваливаться на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 30,3±3,0 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (400х380х1855)±4.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 дН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Шкаф имеет не регулируемые по высоте опоры в виде подпятников.

2.4 При эксплуатации шкафа устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; нормальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из ЛДСП. Шкаф разделен на 3 секции: в верхней и нижней секции расположены по 1-ой съемной полке из ЛДСП. Верхняя и нижняя секции закрываются дверями из ЛДСП. Средняя секция - открытая ниша. Задняя стенка шкафа изготовлена из плиты декоративной древесноволокнистой (ДВП). Шкаф устанавливается на 4 мобильных подпятника без возможности регулировки. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.10	
• Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.10 - 1 шт., в составе:	
- Стенка левая	1 шт.
- Стенка правая	1 шт.
- Основание	1 шт.
- Полка ламинированная	1 шт.
- Крышка	1 шт.
- Царга	1 шт.
- Полка	3 шт.
- Стенка задняя	1 шт.
- Дверь нижняя	1 шт.
- Дверь верхняя	1 шт.
- Комфорт	18 шт.
- Заслужка конфирмата	18 шт.
- Шланг мебельный	16 шт.
- Поддержатель	8 шт.
- Подпятник мебельный	4 шт.
- Логотип компании	1 шт.
- Плита накладная, монтажная планка	4 комплекта.
- Саморез 4x16	16 шт.
- Гвоздь 1,6x25	60 шт.
- Рукав мебельный, винты с прессшайбой	2 комплекта.
- Ключ шестигранный	1 шт.
- Руководство по эксплуатации	1 шт.
- Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя - в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случае появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратиться к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Езатына, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкафа соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функций устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.10)	☐ Цвет белый	XXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25


 ЕЛАМЕД

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

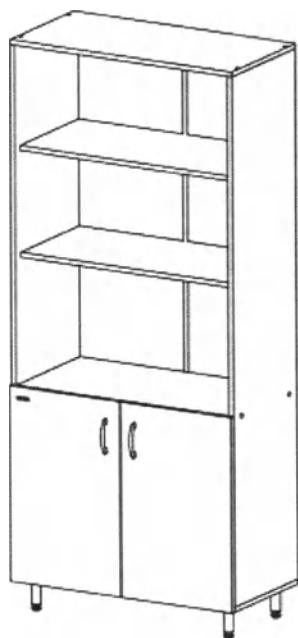

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ (мод.15)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.106-01 РЭ

ОМ 29.1209.00 от 01.06.2023 г.

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.15) (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специализированном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, лекарственных препаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаются дезинфекционной обработке.

Назначение и применение: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или кабинете врача по профилю для размещения медицинских изделий для организации процедур по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и мониторинга состояния организма человека.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться и опираться на верхние грани открытой двери!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 45,8±4,5 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (800x448x1852)± 4.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 дН. Угол открывания двери шкафа должен быть не менее 90°. Шкаф имеет 4 опоры в виде подкадных ножек, регулируемые по высоте.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категориями 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из ЛДСП. Шкаф состоит из 2-х секций. В верхней открытой секции расположены 2 полки из ЛДСП, а нижней закрытой – одна съемная полка из ЛДСП. Нижняя секция закрывается дверями из ЛДСП. Задняя стенка шкафа изготовлена из ДВП. Шкаф устанавливается на 4 регулируемые опоры. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке предоставляемой предприятием - изготовителем.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.15	
• Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.15 – 1 компл., в составе:	
– Основание	1 шт.
– Стенка левая	1 шт.
– Стенка правая	1 шт.
– Крышка	1 шт.
– Стенка задняя	2 шт.
– Полка несъемная	1 шт.
– Полка	3 шт.
– Дверь левая	1 шт.
– Дверь правая	1 шт.
– Евроанкет	12 шт.
– Заглушка евроанкет	8 шт.
– Шпатель небольшой	12 шт.
– Опора	4 шт.
– Винт М4х25	16 шт.
– Гайка 4	16 шт.
– Шайба 4	16 шт.
– Гвоздь 1,6х25	52 шт.
– Петля 4-х шарнирная 90/110	4 шт.
– Саморез 4х16	16 шт.
– Ручка мебельная	2 шт.
– Винт с прессшайбой М4х20	4 шт.
– Поддержатель	12 шт.
– Брус соединительный 1102 мм	1 шт.
– Брус соединительный 606 мм	1 шт.
– Ключ шестигранный 4 мм	1 шт.
– Логотип компании	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамин по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратиться к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатейка, ул. Янина, 25, АО «Елатейский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии
8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже $+10^{\circ}\text{C}$ изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкафа соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеназженных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручки двери не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.15)	☐ Цвет белый	XXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатма, ул. Янина, 25



Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: ipri@elamed.com

Сайт компании: ipri.elamed.com

Регистрационное удостоверение №



ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942818.107ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ (мод.16)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.106-03 РЗ

ОМ 29.1210.00 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.16) (в дальнейшем шкаф), предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях) для размещения медицинских изделий, лекарственных препаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинга состояния организма человека, и подвергается дезинфекционной обработке.

Назначение и применение: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или кабинете врача по профилю для размещения медицинских изделий для организации процедур по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и мониторинга состояния организма человека.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокотиться и наклоняться на полностью выдвинутую выдвижную полку, на верхние грани выдвинутых ящиков и открытой двери!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 59,2±5,9 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (842x462x1852)± 4.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг;

- 7 кг - на дно ящика полимерного;

- 1,5 кг - на полку выдвижную из плиты ламинированной древесностружечной;

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафа должен быть не менее 90°. Усилие выдвигания ящика и выдвижной полки не должно превышать 5 даН. Шкаф имеет 4 опоры в виде подставных ножек, регулируемые по высоте.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; максимальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из ЛДСП, фасад дверей - из пластика. Шкаф состоит из 2-х секций. В верхней открытой секции расположены 2 стационарных и одна выдвижная полки из ЛДСП. Нижняя, образованная верхней полкой, разделена на 4 отсека тремя перегородками. Секция разделена двумя выдвижными ящиками из пластика. В нижней секции, закрываемой двумя пластиковыми дверями с фиксацией магнитами, расположены две съемные полки из ЛДСП. Задняя стенка шкафа изготовлена из ДВП. Шкаф устанавливается на 4 регулируемые опоры. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия - изготовителя.

3. Канцелярский перечень:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.16	
• Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.16 - 1 комплект, в составе:	
- Стенка левая	1 шт.
- Стенка правая	1 шт.
- Перегородка нижняя	1 шт.
- Основание	1 шт.
- Крышка	1 шт.
- Полка межсекционная	1 шт.
- Полка	2 шт.
- Полка	1 шт.
- Полка верхняя	1 шт.
- Полка выдвижная	1 шт.
- Перегородка	3 шт.
- Фасад ящика	2 шт.
- Корпус ящика	2 шт.
- Стенка задняя	2 шт.
- Стенка задняя	2 шт.
- Дверь	2 шт.
- Конфирмат	20 шт.
- Заглушка конфирмата	14 шт.
- Шкант мебельный	16 шт.
- Опора	4 шт.
- Винт М4х25	16 шт.
- Саморез с прессшайбой 4,2x14	15 шт.
- Заглушка саморезов	16 шт.
- Саморез 3x12	4 шт.
- Штифт ветли	4 шт.
- Направляющие для выдвижной полки	1 комплект.
- Направляющие	2 комплекта.
- Петля ввертная	4 шт.
- Брус соединительный 1102 мм	1 шт.
- Саморез 3,5x13	20 шт.
- Саморез 4,5x16	8 шт.
- Винт М4х30	4 шт.
- Ключ шестигранный 4 мм	1 шт.
- Саморез 3,5x16	4 шт.
- Листовая пленка	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя..

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручки двери не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приеме

Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.16)	☐ Цвет белый	XXXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25


Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение №

ЕЛАМЕД

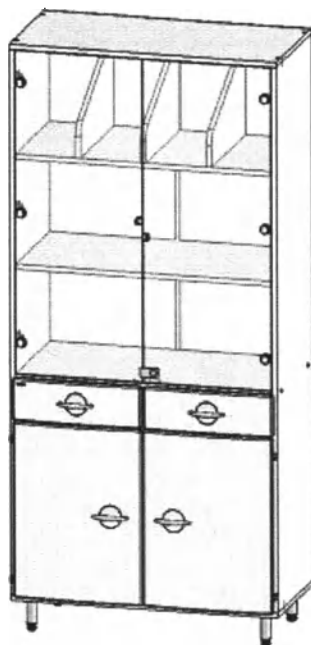

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ (мод.17)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.106-04 РЭ

ОМ 29.1211.00 от 01.08.2023 г.

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.17) (в дальнейшем шкаф), предназначен для размещения в специальном помещении (процедурном кабинете, операционной, лаборатории) для размещения медицинских изделий, фантомов, для проведения медицинских исследований, натуральных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека, и подвергаться дезинфекционной обработке.

Назначение: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или кабинете врача по профилю для размещения медицинских изделий для организации процедур по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться и надавливать на верхние грани выдвинутых ящиков и открытой двери!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 64,5±6,4 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (842x462x1852)±4.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг;

- 7 кг - на дно ящика полноразмерного;

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 дН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 90°. Усилие выдвижения ящика не должно превышать 5 дН. Шкаф имеет 4 опоры в виде подставных ножек, регулируемые по высоте.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категория 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

2.5 Изделие изготовлено из ЛДСП. Шкаф состоит из 2-х секций. В верхней секции расположены 2 стационарных полки из ЛДСП. Нижняя секция закрыта двумя дверями из прозрачного стекла с индивидуальными замками. Секция разделена двумя выдвижными ящиками из пластика. В нижней секции, закрываемой двумя пластиковыми дверями с фиксацией магнитом, расположены две съемные полки из ЛДСП. Задняя стенка шкафа изготовлена из ДВП. Шкаф устанавливается на 4 регулируемые опоры. Изделие поставляется в разобранном виде. Сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями производителя - изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.17	
• Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий мод.17 - 1 шт., в составе:	
- Стенка левая	1 шт.
- Стенка правая	1 шт.
- Перегородка нижняя	1 шт.
- Основание	1 шт.
- Крышка	1 шт.
- Полка межсекционная	1 шт.
- Полка	2 шт.
- Полка	1 шт.
- Полка верхняя	1 шт.
- Дверь	2 шт.
- Перегородка	3 шт.
- Фасад шкафа	2 шт.
- Корпус ящика	2 шт.
- Стенка задняя	2 шт.
- Стенка задняя	2 шт.
- Стеклодержатель левый	1 шт.
- Стеклодержатель правый	1 шт.
- Евроанкет	20 шт.
- Заглушка евроанкет	14 шт.
- Шкапит мебельный	16 шт.
- Опора	4 шт.
- Винт М4х25	16 шт.
- Гайка 4	16 шт.
- Шайба 4	16 шт.
- Гвоздь 1,6х25	52 шт.
- Магнит	2 шт.
- Подпорка	16 шт.
- Ручка мебельная	4 шт.
- Винт М4х25	4 шт.
- Саморез с прессшайбой 4,2х14	13 шт.
- Заглушка самонавинчивающаяся	16 шт.
- Саморез 3х12	4 шт.
- Штифт ветки	4 шт.
- Петля для стекла стандартная (90/105) квадратная	6 шт.
- Ниперилон	2 комплекта.
- Саморез 4х16	12 шт.
- Петля шарнирная	4 шт.
- Брус соединительный 1102 мм	1 шт.
- Саморез 3,5х13	16 шт.
- Саморез 4,5х16	8 шт.
- Винт М4х30	4 шт.
- Заглушка декоративная для петель, круглая	6 шт.
- Подпорка в пластиковом чехольчике	1 шт.
- Замок для 2-х дверей, отъемная планка	1 шт.
- Ручка для стеклянных дверей	2 шт.
- Ключ шестигранный 4 мм	1 шт.
- Логотип компании	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	1 шт.
• Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждениях составных частей изделия обратиться к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии

8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе.

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации шкафа.

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручки двери не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функций устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.

10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкафы медицинские ГИКС 942810.107ТУ	Примечание	Код
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.17)	☐ Цвет белый	XXXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXXX

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lrp@elamed.com

Сайт компании: lrp.elamed.com

Регистрационное удостоверение №






Институт по развитию АО «ЕПЗ»

Нижняя Т.Н.


89 20 43

ПАМЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Директор по развитию
АО «Елатомский приборный завод

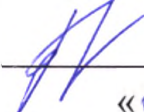 Никитина Т.Н.
«07» 09 2023

Инструкции по сборке медицинского изделия
«Шкафы медицинские по ГИКС.942810.107 ТУ»

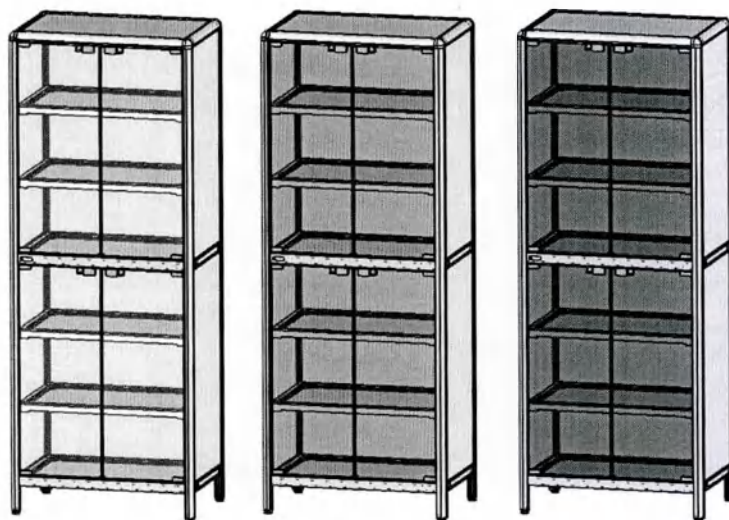

Условные обозначения:

1. А-М : детали

2. 1 - 14 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 18 : этапы сборки

□ Код товара

□ Код товара

□ Код товара

Детали


№	Наименование	Кол-во
А	Крышка	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Стенка задняя верхняя	1
Д	Прогон задний	2
Е	Стенка задняя нижняя	1
Ж	Прогон средний передний	1
З	Прогон нижний передний	1
И	Заглушка прогона и крышки	4
К	Заглушка под ограничитель	2
Л	Полка пластиковая	6
М	Стеклянная дверца	4

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	4	Опора	
2	4	Накладка для магнитной защёлки	
3	8	Петля	
4	4	Ручка стеклянных дверей	
5	24	Полкодержатель	
6	1	Заглушка декоративная	
7	4	Площадка магнитной защёлки	
8	8	Саморез 3x16	
9	4	Магнитная защёлка	
10	18	Саморез 3x12	
11	2	Ограничитель стеклянных дверей	
12	1	Ключ шестигранник малый	
13	1	Ключ шестигранник большой	
14	1	Логотип компании	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности


ОМ 29.441.01 Произведите сборку крышки Рекомендации для сборки: разложите на твёрдой поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборку деталей и изделий!

1 этап


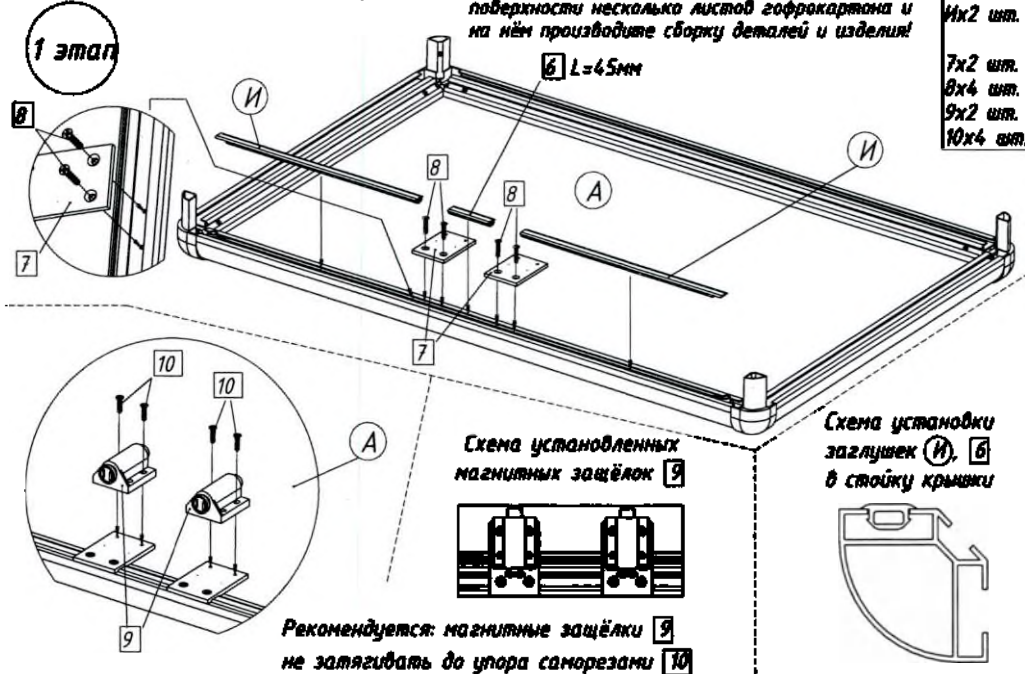


2 этап

Произведите сборку прогона среднего переднего

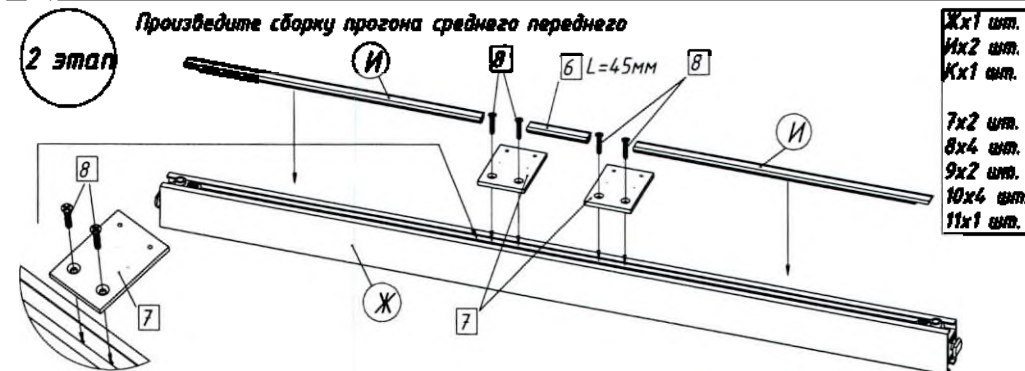


Рекомендуется: магнитные защёлки 9 не затягивать до упора саморезами 10

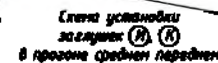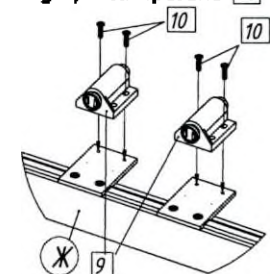

11x1 шт.
11x2 шт.
11x1 шт.
7x2 шт.
8x4 шт.
9x2 шт.
10x4 шт.
11x1 шт.


ОМ 29.441.01 Произведите сборку прогона нижнего переднего

3 этап

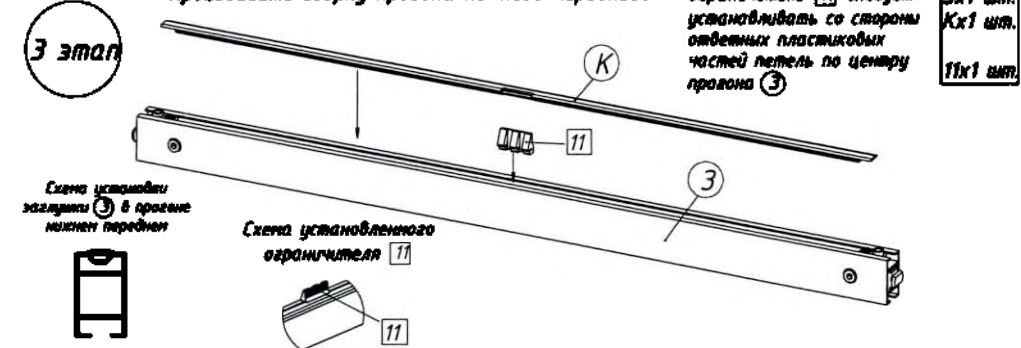

4 этап

Произведите сборку стенки левой

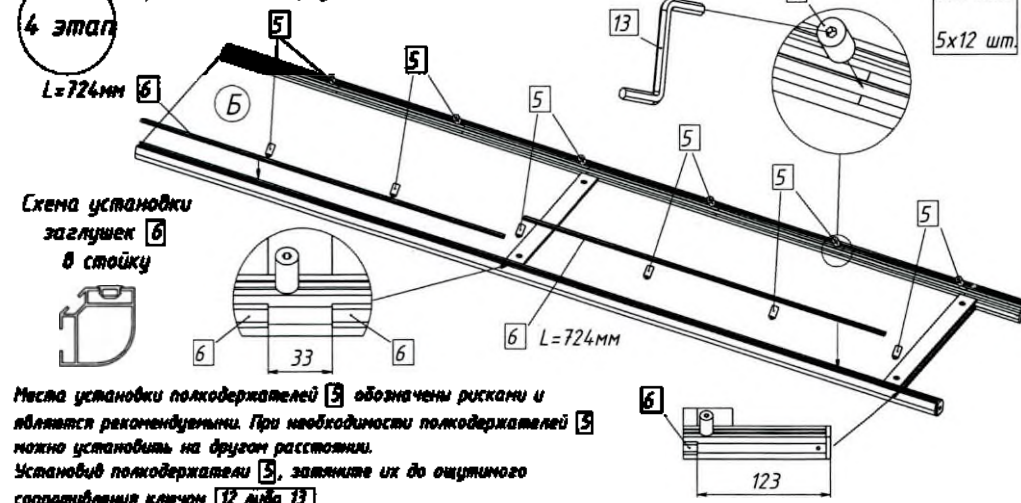

5 этап

Произведите сборку стенки правой

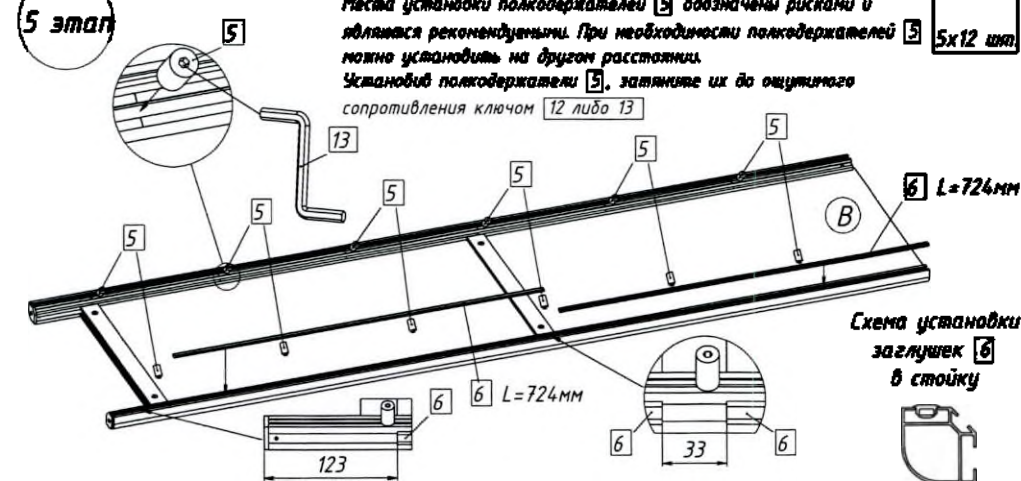


Схема сборки изделия

6 этап

Произведите установку стенок боковых


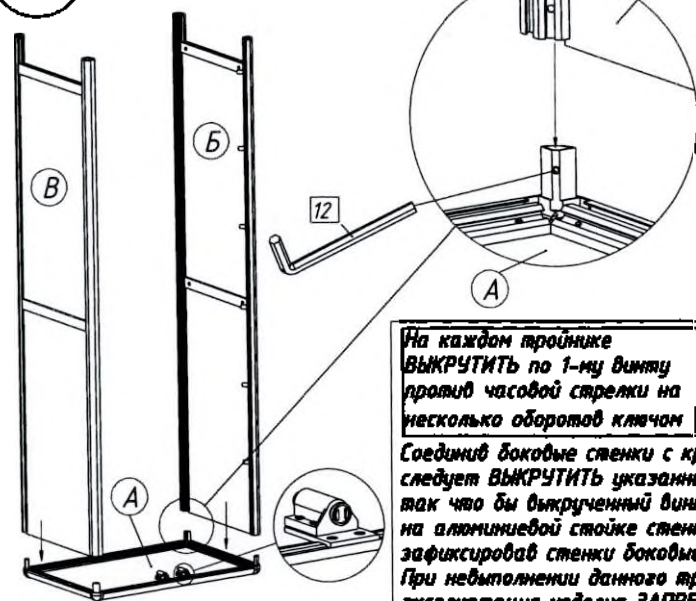


Схема фиксации стенок боковых с крышкой изделия

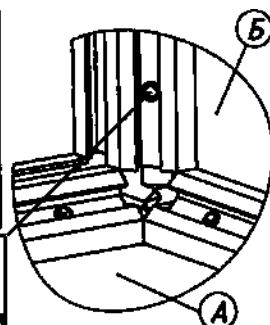

На каждом тройнике **ВЫКРУТИТЬ** по 1-му винту против часовой стрелки на несколько оборотов ключом 12



Соединив боковые стенки с крышкой, обязательно следует **ВЫКРУТИТЬ** указанный винт на каждом тройнике, так что бы выкрученный винт попал в отверстие на алюминиевой стойке стенки боковой, тем самым зафиксировав стенки боковые с крышкой. При невыполнении данного требования, эксплуатация изделия **ЗАПРЕЩЕНА!!**

Ах1 шт.
Бх1 шт.
Вх1 шт.

7 этап

Произведите установку стенок и прогонов задних

Схема установки прогонов

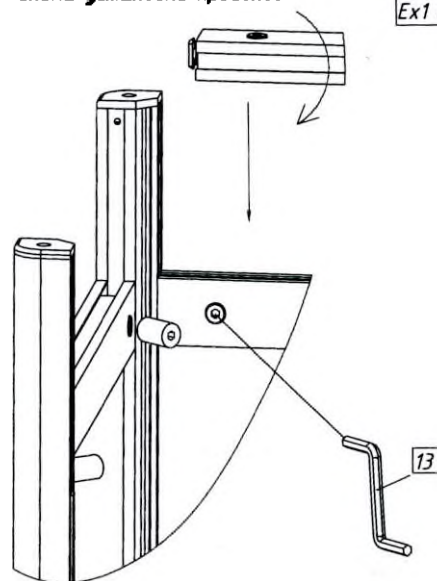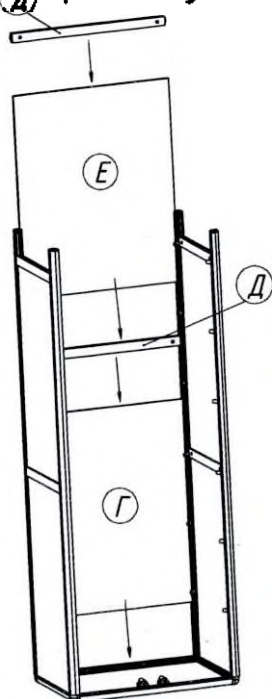



Установив прогоны (Д), затяните фиксирующие замки до ощутимого сопротивления ключом 13

Гх1 шт.
Дх2 шт.
Ех1 шт.

Произведите установку прогонов передних


8 этап

Перед установкой прогонов (Ж) и (З), вытащите края заглушек декоративных из пазов стенок боковых (Б) и (В), после установки прогонов (Ж) и (З), вставьте обратно заглушки в пазы профилей

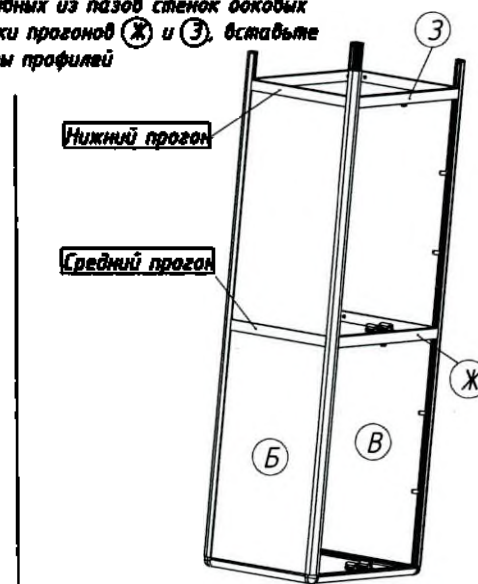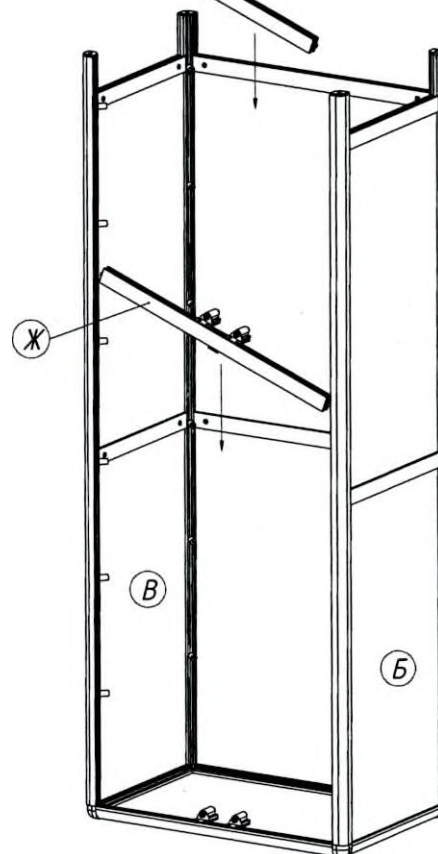

Нижний прогон

Средний прогон

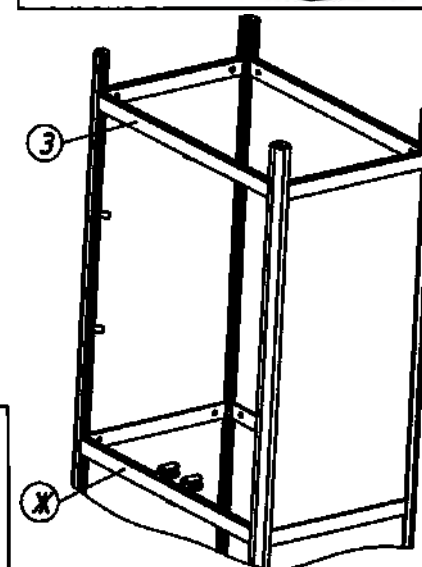

Установив прогоны (Ж) и (З), затяните фиксирующие замки до ощутимого сопротивления ключом 13

Прогон нижний передний (З) должен быть выровнен с нижними прогонами боковых стенок (Б) и (В). Прогон средний передний (Ж) должен быть выровнен со средними прогонами боковых стенок (Б) и (В). В результате прогоны (Ж) и (З) должны находиться на одном уровне с нижними и средними прогонами стенок боковых (Б) и (В).

Жх1 шт.
Зх1 шт.


ОМ 29.441.01

Произведите установку опор путём вкручивания их по часовой стрелке

9 этап

Опоры 1 следует закручивать рожковым ключом 10 по часовой стрелке либо плоскогубцами. **ВНИМАНИЕ:** Рожковый ключ 10, плоскогубцы не входят в комплект поставки изделия


1х4 шт

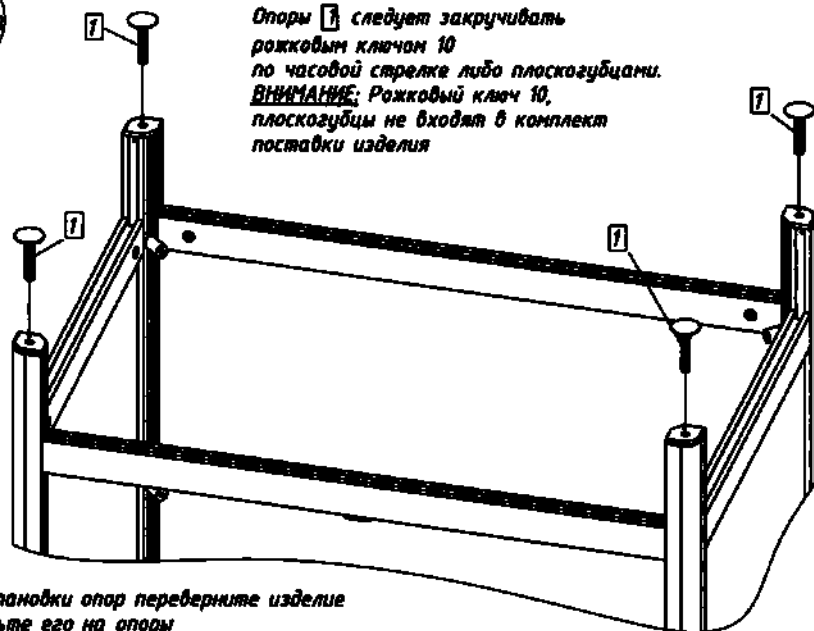

После установки опор переверните изделие и поставьте его на опоры

Собранный каркас шкафа

10 этап

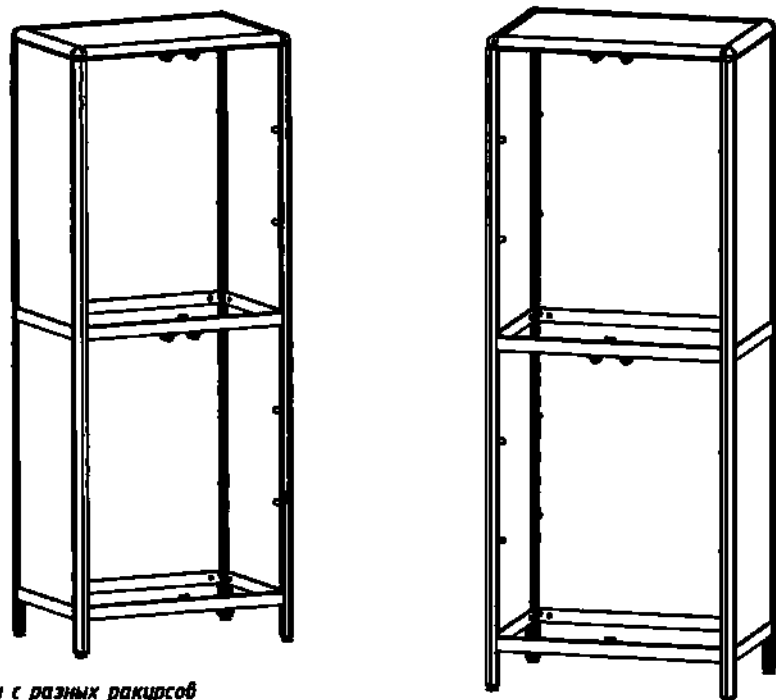


Указаны виды с разных ракурсов

ОМ 29.441.01


Произведите установку полок в нижнее отделение шкафа

11 этап

1х3 шт

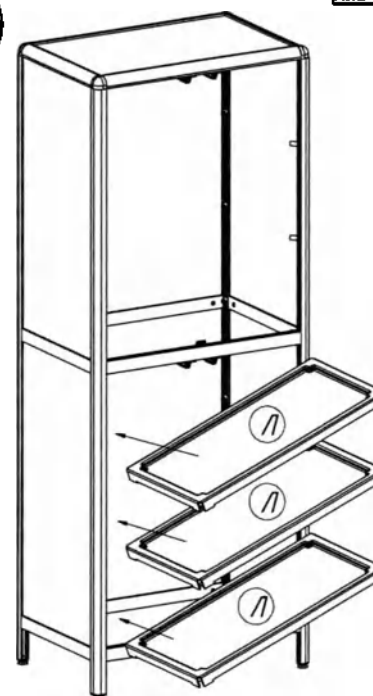


При необходимости положение полок 3 можно менять, путём смещения (регулировкой) полкодержателей 5 по вертикали

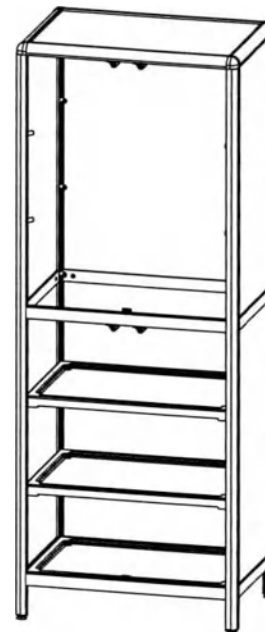


12 этап

Произведите установку полок в верхнее отделение шкафа

1х3 шт

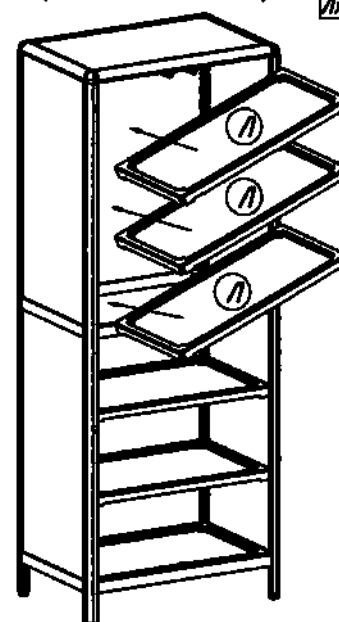


При необходимости положение полок 3 можно менять, путём смещения (регулировкой) полкодержателей 5 по вертикали

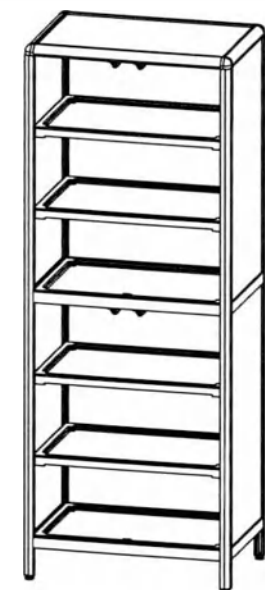


Во избежание повреждения стеклянных дверей шкафа, их установку рекомендуется выполнять сборщикам в количестве 2-х человек, а так же перед их установкой необходимо проверить:

- винты замков установленных прозенов надежно затянуты, и шкаф не имеет диагональных перекосов;
- наличие в каждой петле [3] пластиковых прокладок и колпачков на затяжных винтах;
- если хотя бы одно из условий не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия **ЗАПРЕЩЕНА!**

13 этап Схема установки стеклянных дверей нижних

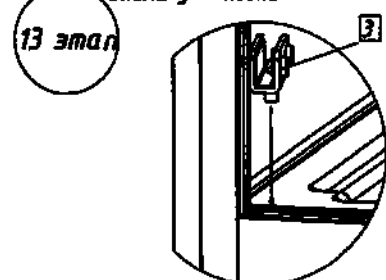


Установите нижние петли [3]

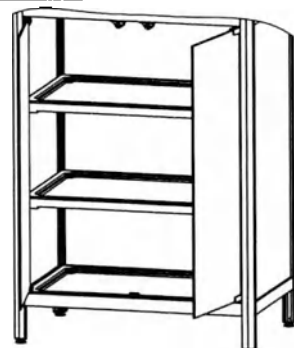

Установленные нижние стеклянные двери


Схема установки стеклянной двери в петле

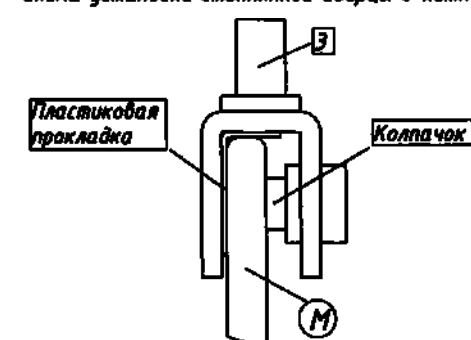

Внимание: Установку стеклянных дверей производить только в вертикальном положении шкафа. После установки стеклянных дверей (М) необходимо затянуть все фиксирующие винты петель [3] до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов, это может привести к порче стеклянной двери.

Установив верхние петли [3] и придерживая их от выпадения, вставьте между петель стеклянные двери без перекосов.

Мх2 шт.
3х4 шт.

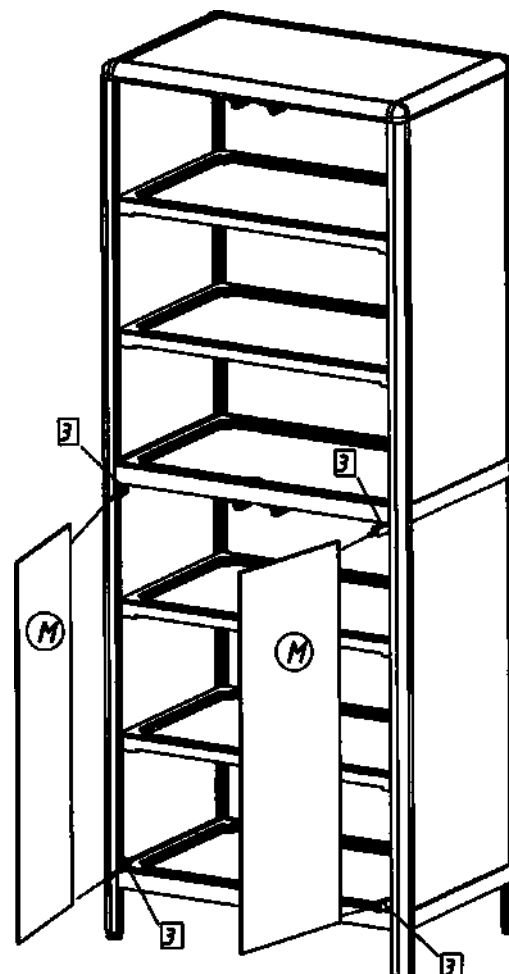

Произведите установку металлических планок и ручек на нижние стеклянные двери

2х2 шт.
4х2 шт.

14 этап

Схема затяжки винта на ручке [4] стеклянной двери левой



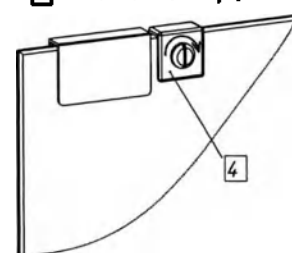


Схема затяжки винта на ручке [4] стеклянной двери правой

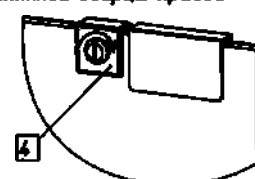


Стеклянные двери в закрытом положении

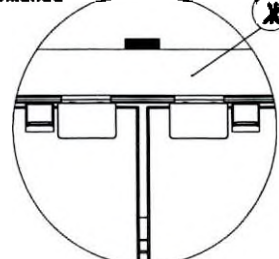


Установив на стеклянные двери накладки для магнитной защёлки [2] и ручки [4], отрегулируйте их положение таким образом, что бы при закрытых стеклянных дверях (М) накладки для магнитной защёлки [2] всей поверхностью соприкасались с магнитными защёлками, ручки [4] не препятствовали свободному закрыванию/открыванию стеклянных дверей (М). Затяните на ручках фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов на ручках, это может привести к порче стеклянной двери. При необходимости возможна регулировка магнитных защёлок, см. Этап 15



ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения стеклянной двери при установке планок [2] и ручек [4] необходимо убедиться в наличии колпачков на затяжных винтах ручек [4], а так же установленной защитной прокладке, в металлической планке [2]. Если защитные элементы будут отсутствовать, установка данных деталей на изделие **ЗАПРЕЩЕНА!**

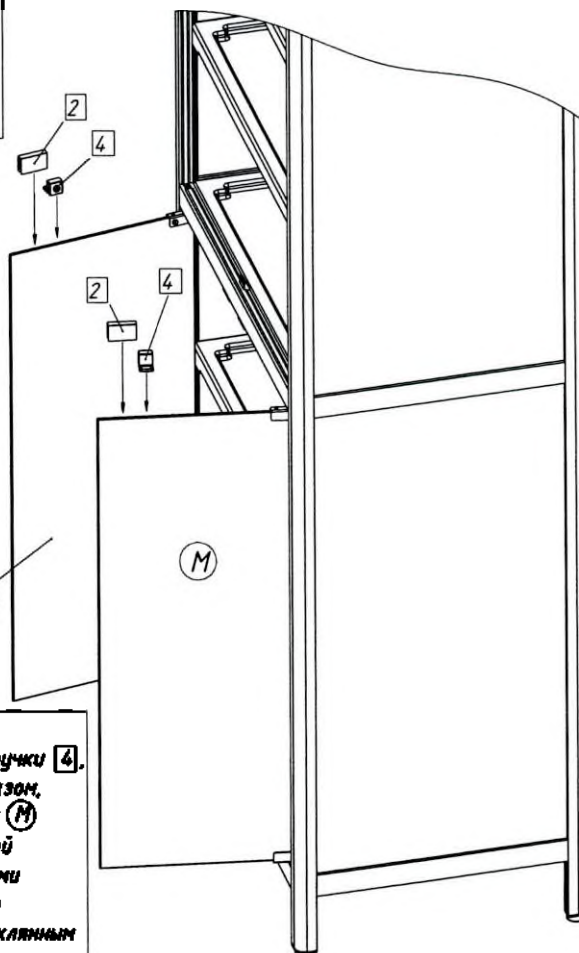

15 этап

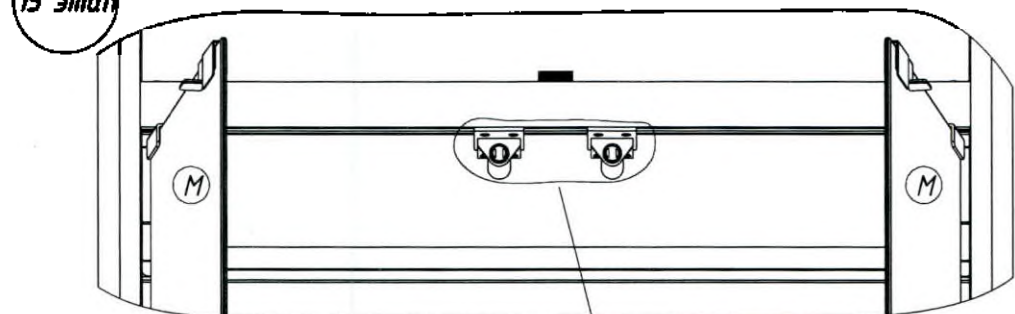

ВНИМАНИЕ: Шило не входит в комплект поставки изделия

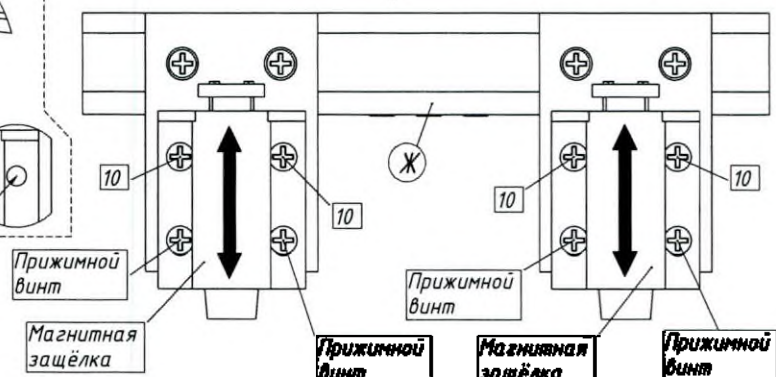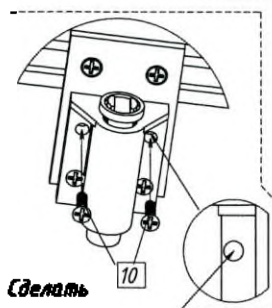

Открыв стеклянные двери (М) ослабьте при необходимости прижимные винты и сдвиньте в требуемое положение обе магнитные защёлки. По завершению регулировки, затяните на магнитных защёлках прижимные винты до ощутимого сопротивления. В площадке магнитной защёлки сделайте отверстие при помощи «шила» для вкручивания фиксирующих винтов 10 и затяните фиксирующие винты 10. Опасайтесь чрезмерной затяжки прижимных и фиксирующих винтов 10 на каждой из магнитных защёлок, это может привести к порче её корпуса.

Стеклянные двери в закрытом положении


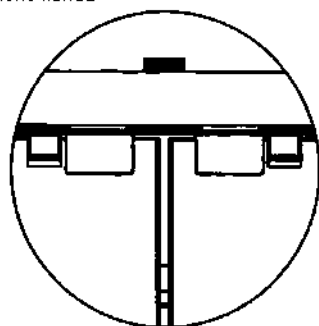


Схема фиксации стеклянных дверей магнитной защёлкой

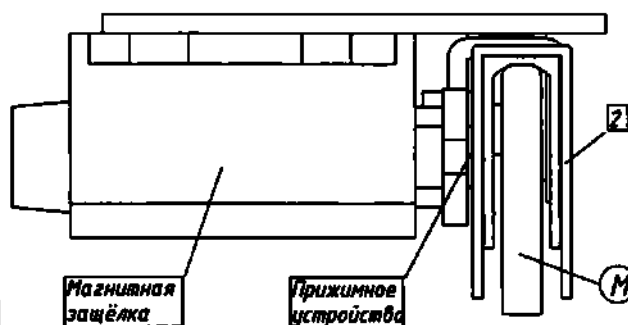


Во избежание повреждения стеклянных дверей шкафа, их установку рекомендуется выполнять сборщикам в количестве 2-х человек, а так же перед их установкой необходимо проверить:

- винты замков установленных прогонов надежно затянуты, и шкаф не имеет диагональных перекосов;
- наличие в каждой петле 3 пластиковых прокладок и колпачков на затяжных винтах;
- если хотя бы одно из условий не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНА!!

Схема установки стеклянных дверей верхних


16 этап

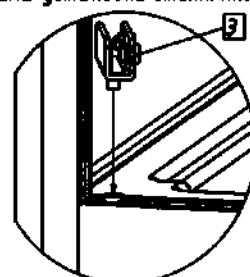

Установив верхние петли 3 и придерживая их от выпадения, вставьте между петлей стеклянные двери без перекосов.


Мх2 шт.
Зх4 шт.

Установите нижние петли 3

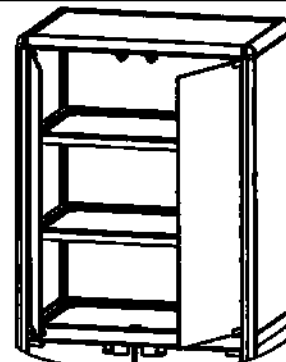

Установленные верхние стеклянные двери

Схема установки стеклянной двери в петле

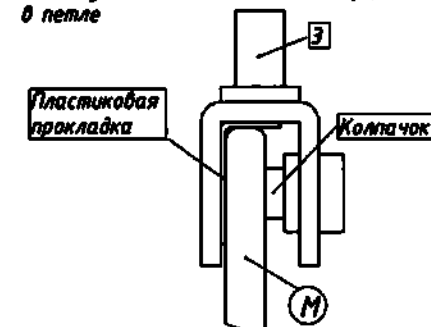

Наклейте самоклеющийся логотип компании 14



Внимание: Установку стеклянных дверей производить только в вертикальном положении шкафа. После установки стеклянных дверей (М) необходимо затянуть все фиксирующие винты петель 3 до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов, это может привести к порче стеклянной двери.

17 этап

Схема затяжки винта на ручке 4 стеклянной двери левой



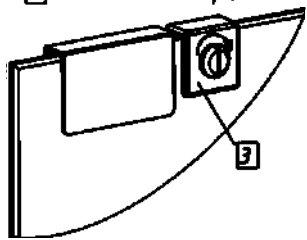


Схема затяжки винта на ручке 4 стеклянной двери правой

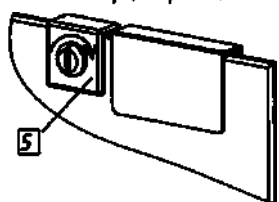


Стеклянные двери в закрытом положении

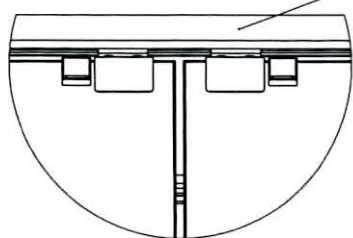

Установив на стеклянные двери накладки для магнитной защёлки 2 и ручки 4, отрегулируйте их положение таким образом, что бы при закрытых стеклянных дверях М накладки для магнитной защёлки 2 своей поверхностью соприкасались с магнитными защёлками, ручки 4 не препятствовали свободному закрытию/открытию стеклянным дверцам М. Затяните на ручках фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов на ручках, это может привести к порче стеклянной двери. При необходимости возможна регулировка магнитных защёлок, см. Этап 18



ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения стеклянной двери при установке планок 2 и ручек 4 необходимо убедиться в наличии колпачков на затяжных винтах ручек 4, а так же установленной защитной прокладке, в металлической планке 2. Если защитные элементы будут отсутствовать, установка данных деталей на изделие ЗАПРЕЩЕНА!!

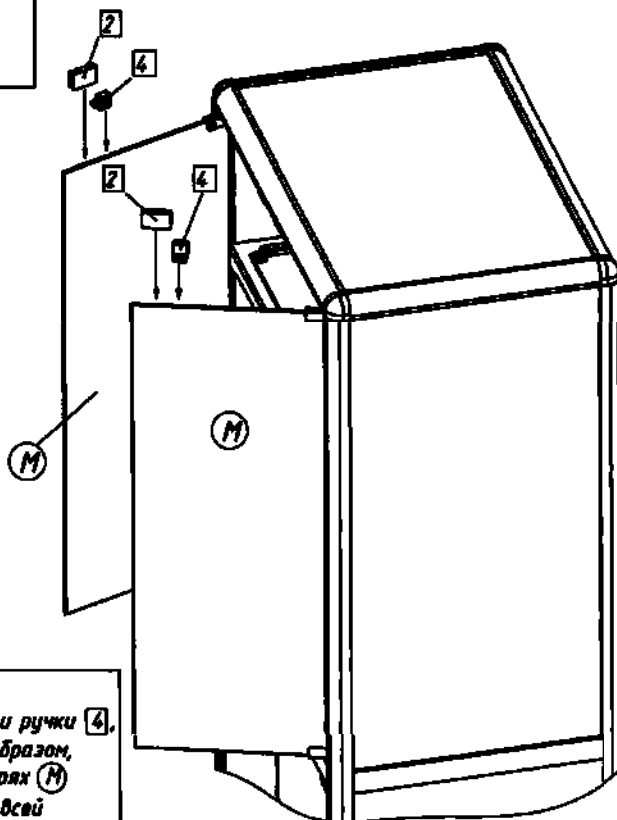2x2 шт.
4x2 шт.

10x4 шт.

18 этап

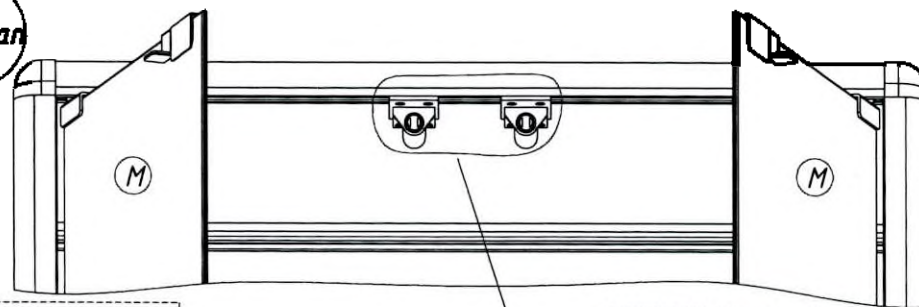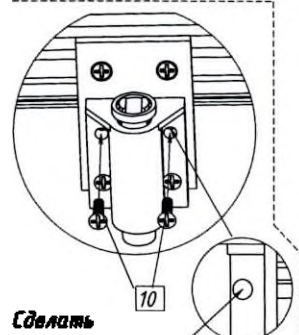**ВНИМАНИЕ:** Шило не входит в комплект поставки изделия

Сделать самостоятельно дополнительное отверстие для установки фиксирующих винтов 10

Прижимной винт

Магнитная защёлка

Прижимной винт

Магнитная защёлка

Прижимной винт

Магнитная защёлка

Открыв стеклянные двери М ослабьте при необходимости прижимные винты и сдвиньте в требуемое положение обе магнитные защёлки. По завершению регулировки, затяните на магнитных защёлках прижимные винты до ощутимого сопротивления. В площадке магнитной защёлки сделайте отверстие при помощи «шила» для вкручивания фиксирующих винтов 10 и затяните фиксирующие винты 10. Опасайтесь чрезмерной затяжки прижимных и фиксирующих винтов 10 на каждой из магнитных защёлок, это может привести к порче её корпуса.

Стеклянные двери в закрытом положении


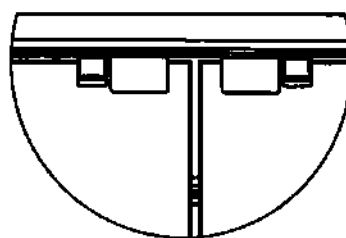


Схема фиксации стеклянных дверей магнитной защёлкой

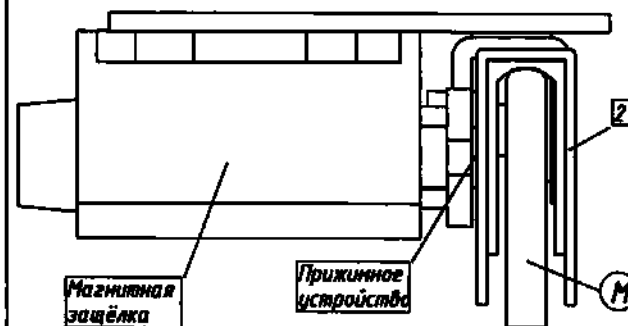


Магнитная защёлка

Прижимное устройство

Инструкция по сборке изделия
Шкафы медицинские по ГИКС.942810.107 ТУ

Шкаф медицинский лабораторный (мод.2) в вариантах поставки 1 - 3

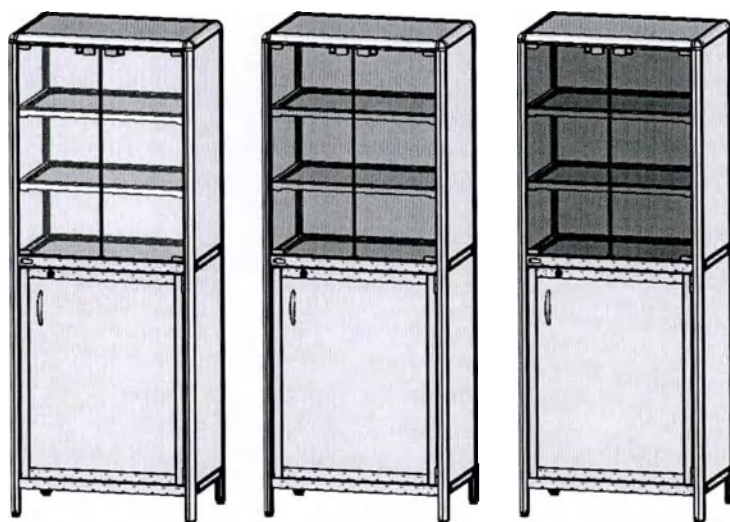

Условные обозначения:

1. А-Р : детали

□ Код товара

□ Код товара

□ Код товара

2. 7 - 24 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 20 : этапы сборки

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Крышка	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Стенка задняя верхняя	1
Д	Прогон средний задний	1
Е	Стенка задняя нижняя	1
Ж	Прогон нижний задний	1
З	Прогон средний передний	1
И	Прогон нижний передний	1
К	Заглушка крышки	2
Л	Заглушка под ограничитель	1
М	Полка ЛДСП нижняя	1
Н	Полка ЛДСП	2
О	Полка пластиковая	3
П	Дверь нижняя	1
Р	Стеклопанель дверца	2

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	4	Опора	
2	2	Накладка для магнитной защёлки	
3	4	Петля	
4	2	Ручка стеклянных дверей	
5	20	Полкодержатель	
6	1	Заглушка декоративная	
7	2	Площадка магнитной защёлки	
8	8	Саморез 3x16	
9	2	Магнитная защёлка	
10	12	Саморез 3x12	
11	1	Ограничитель стеклянных дверей	
12	1	Площадка магнитная	
13	1	Магнит	
14	1	Упор замка	
15	4	Заглушка двери нижней	



Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
16	4	Петля двери нижней	
17	2	Штифт для петли	
18	1	Ответная планка магнита	
19	1	Саморез 2,9x13	
20	1	Ручка двери нижней	
21	2	Винт полусфера с прессшайбой М4х14	
22	1	Ключ шестигранный малый	
23	1	Ключ шестигранный большой	
24	1	Логотип компании	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности


Произведите сборку крышки

Рекомендации для сборки: разложите на твёрдой поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборку деталей и изделий!

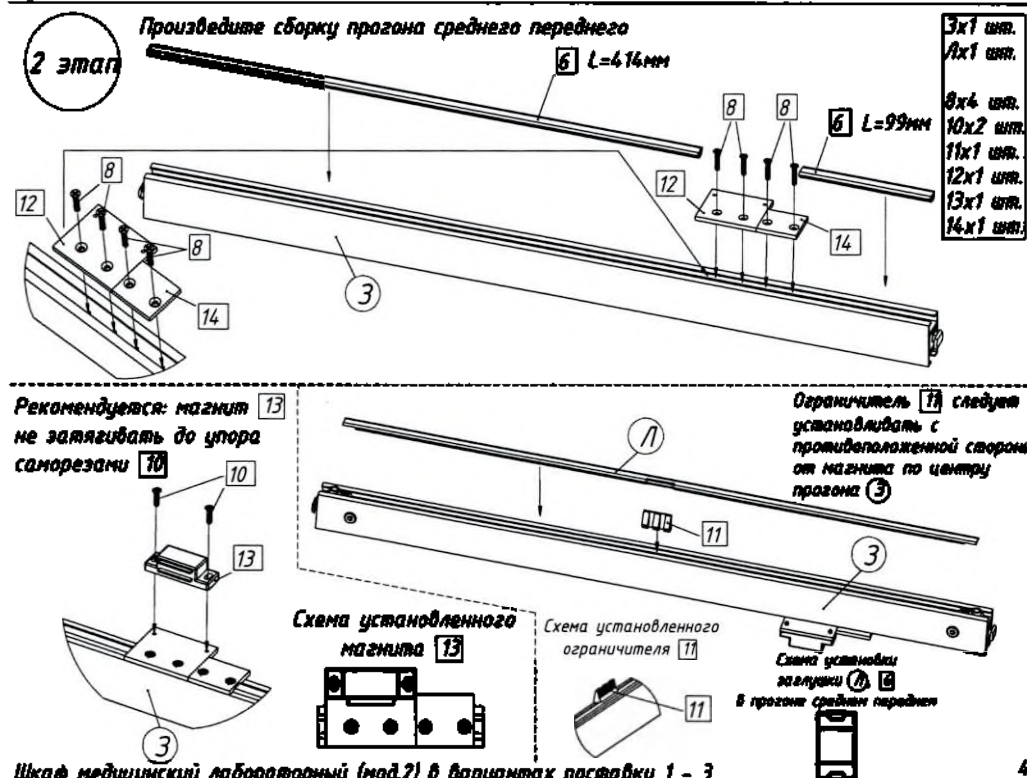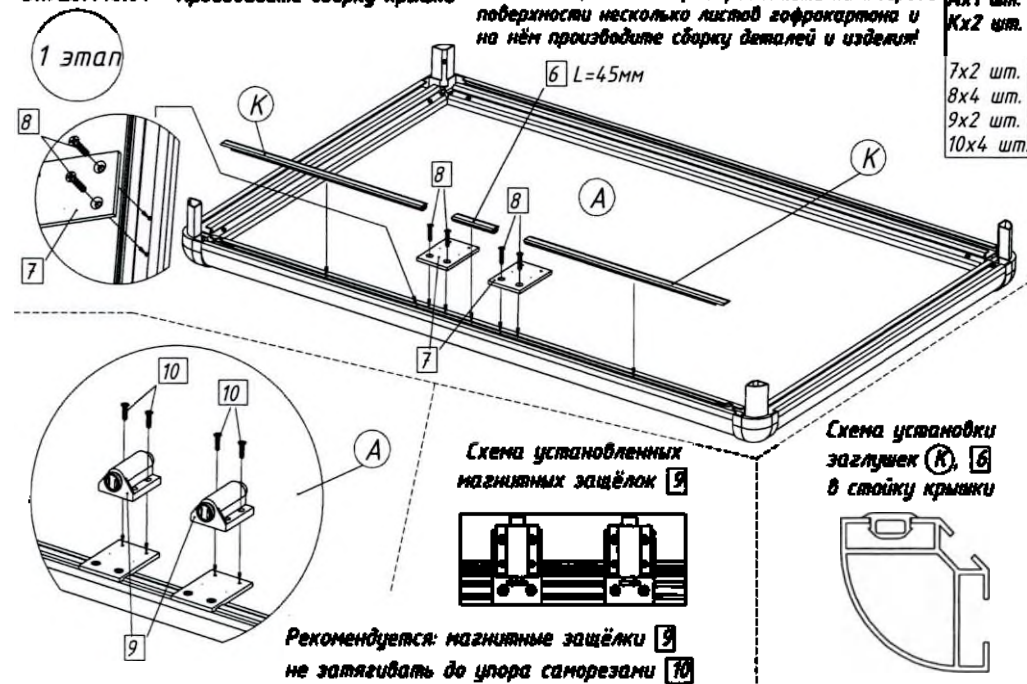

3 этап

Схема установки заглушки 6 в прогон нижний передний

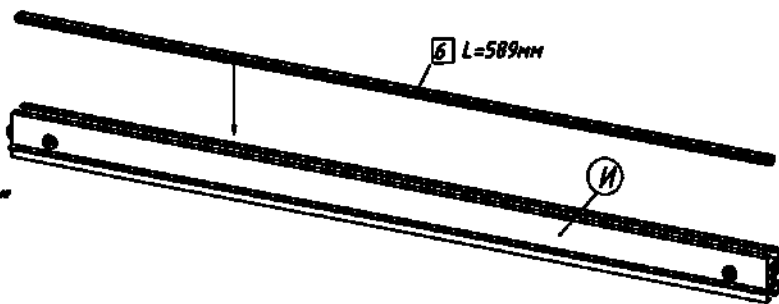

4 этап


Произведите сборку стенки левой

L=724mm

Схема установки заглушек 6 в стойку



Места установки полокдержателей 5 обозначены рисками и являются рекомендуемыми. При необходимости полокдержателей 5 можно установить на другом расстоянии. Установив полокдержатели 5, затяните их до ощутимого сопротивления ключом 22 либо 23

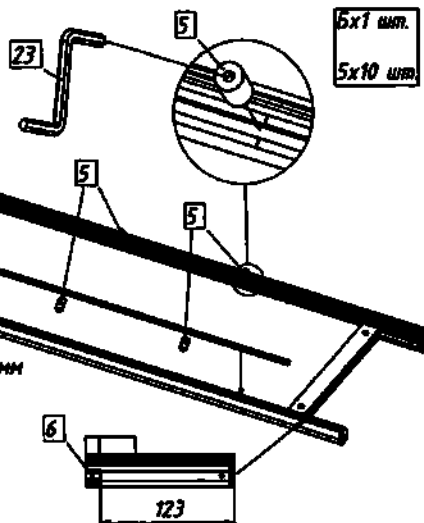



5x1 шт.
5x10 шт.

5 этап

Произведите сборку стенки правой


Перед установкой ответных частей петель 16, выверните против часовой стрелки на несколько оборотов фиксирующие винты ключом 22 либо 23

5x1 шт.
16x2 шт.

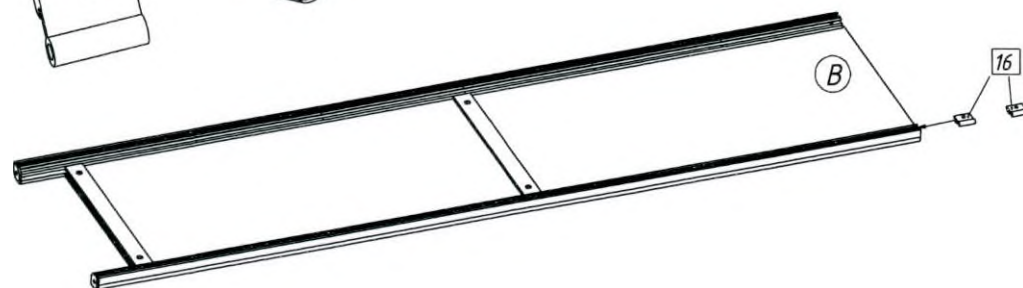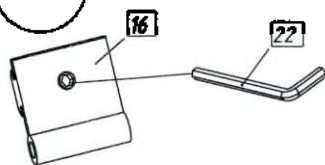


6 этап

5x1 шт.
16x2 шт.

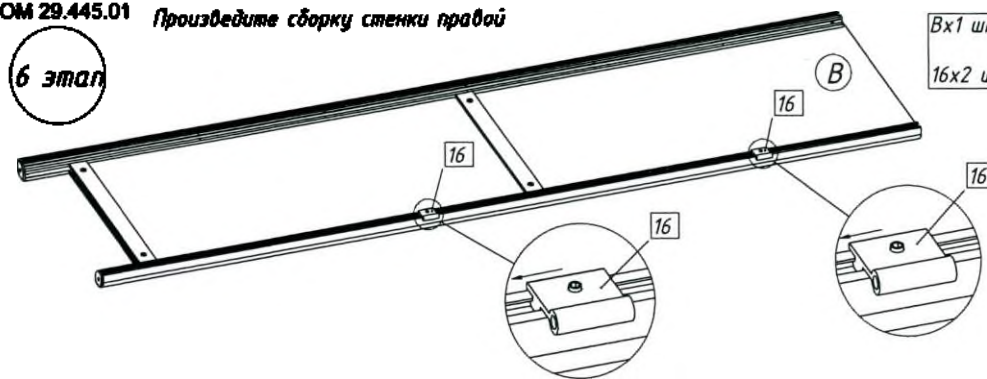

Произведите сборку стенки правой

5x1 шт.
16x2 шт.

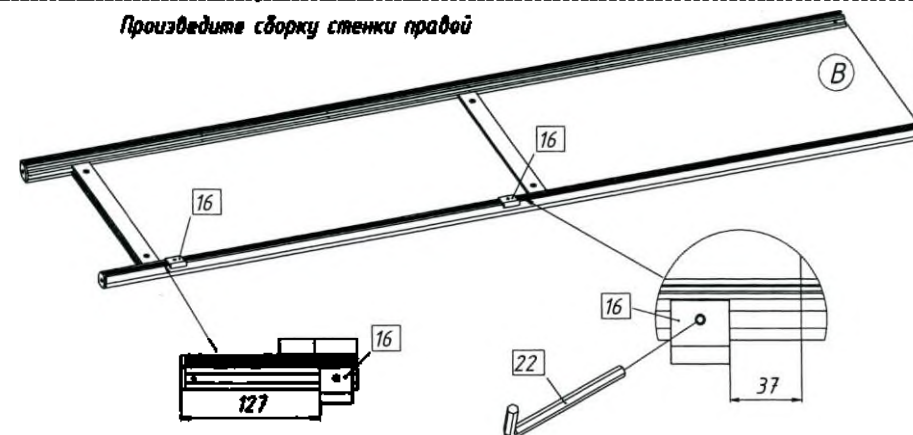

Установив ответные части петель 16, затяните их до ощутимого сопротивления ключом 22 либо 23

7 этап

Произведите сборку стенки правой

Места установки полокдержателей 5 обозначены рисками и являются рекомендуемыми. При необходимости полокдержателей 5 можно установить на другом расстоянии. Установив полокдержатели 5, затяните их до ощутимого сопротивления ключом 22 либо 23

5x1 шт.
5x10 шт.

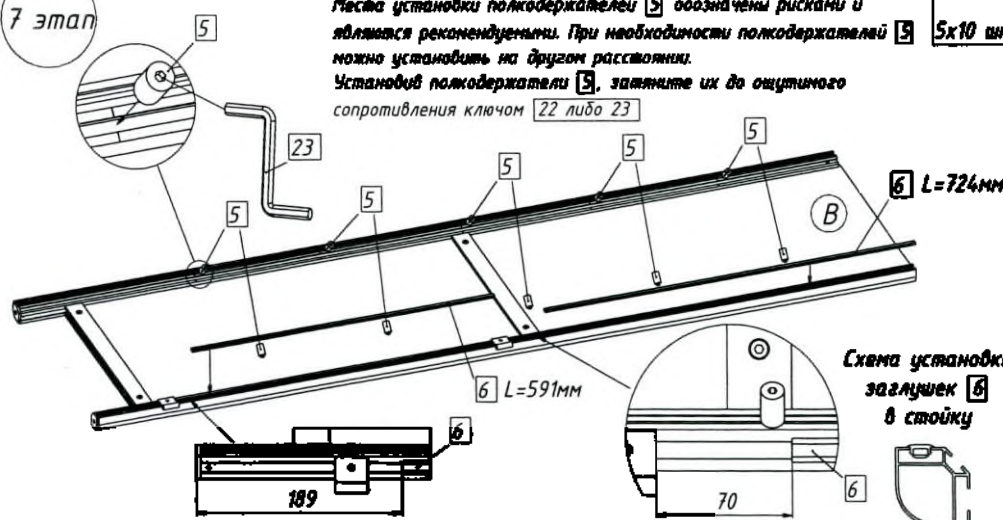




Схема установки заглушек 6 в стойку



Схема сборки изделия

8 этап

Произведите установку стенок боковых

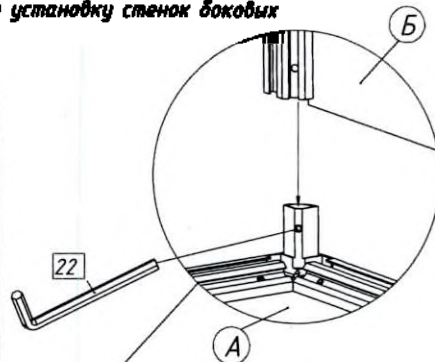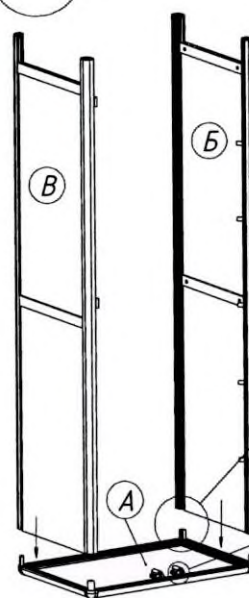


На каждом тройнике
ВЫКРУТИТЬ по 1-му винту
против часовой стрелки на
несколько оборотов ключом 22

Соединив боковые стенки с крышкой, обязательно
следует ВЫКРУТИТЬ указанный винт на каждом тройнике,
так что бы выкрученный винт попал в отверстие
на алюминиевой стойке стенки боковой, тем самым
зафиксировав стенки боковые с крышкой.
При невыполнении данного требования,
эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНА!!!

Схема фиксации стенок боковых с крышкой изделия



Ax1 шт.
Бx1 шт.
Вx1 шт.

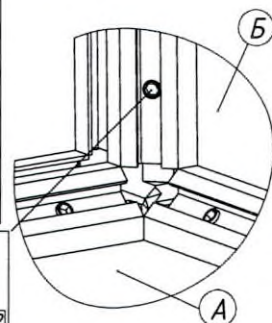

9 этап

Произведите установку стенок и прогонов задних

Схема установки прогонов

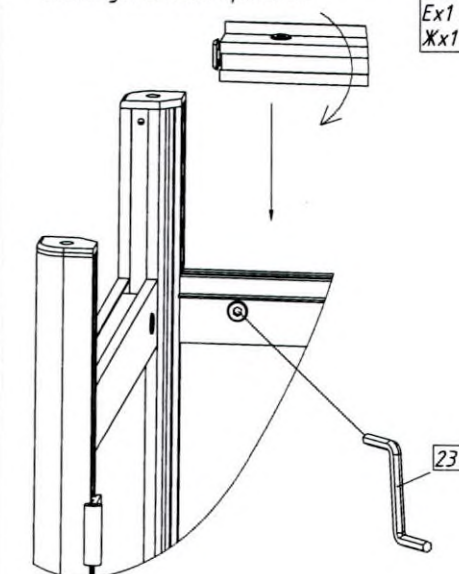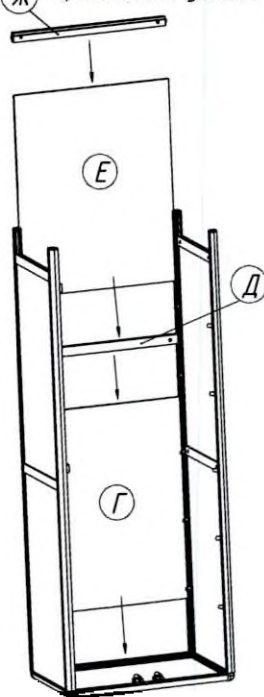


Установив прогоны Д, Ж затяните
фиксирующие замки до ощутимого
сопротивления ключом 23

Гx1 шт.
Дx1 шт.
Еx1 шт.
Жx1 шт.

Произведите установку прогонов передних


10 этап

Перед установкой прогонов 3 и И, вытащите
края заглушек декоративных из пазов стенок боковых
Б и В, после установки прогонов 3 и И, вставьте
обратно заглушки в пазы профилей

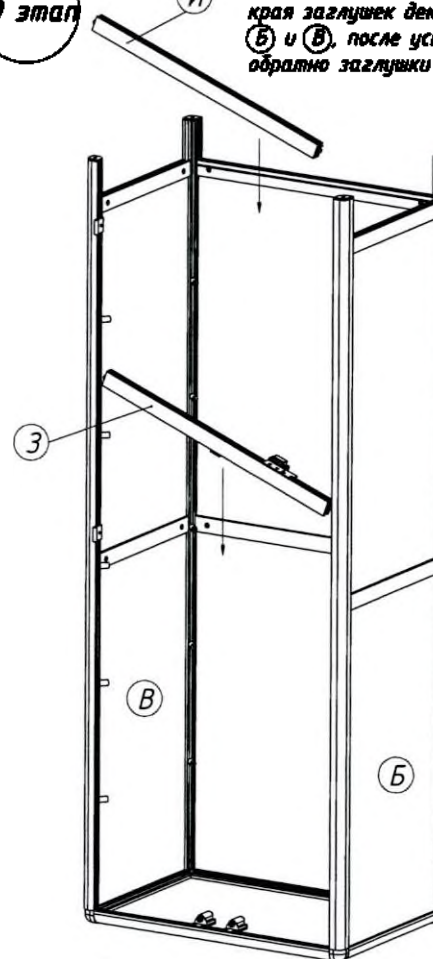

Нижний прогон

Средний прогон

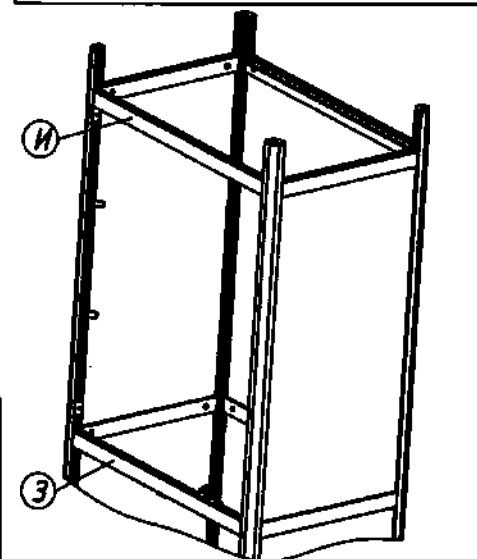

Установив прогоны 3 и И, затяните
фиксирующие замки до ощутимого
сопротивления ключом 23


Прогон нижний передний И должен быть
выровнен с нижними прогонами боковых
стенок Б и В. Прогон средний передний 3
должен быть выровнен со средними
прогонами боковых стенок Б и В.
В результате прогоны 3 и И должны
находиться на одном уровне с нижними и
средними прогонами стенок боковых Б и В

3x1 шт.
Иx1 шт.

11 этап

Опоры 1 следует закручивать рожковым ключом 10 по часовой стрелке либо плоскогубцами. **ВНИМАНИЕ:** Рожковый ключ 10, плоскогубцы не входят в комплект поставки изделия


1x4 шт.

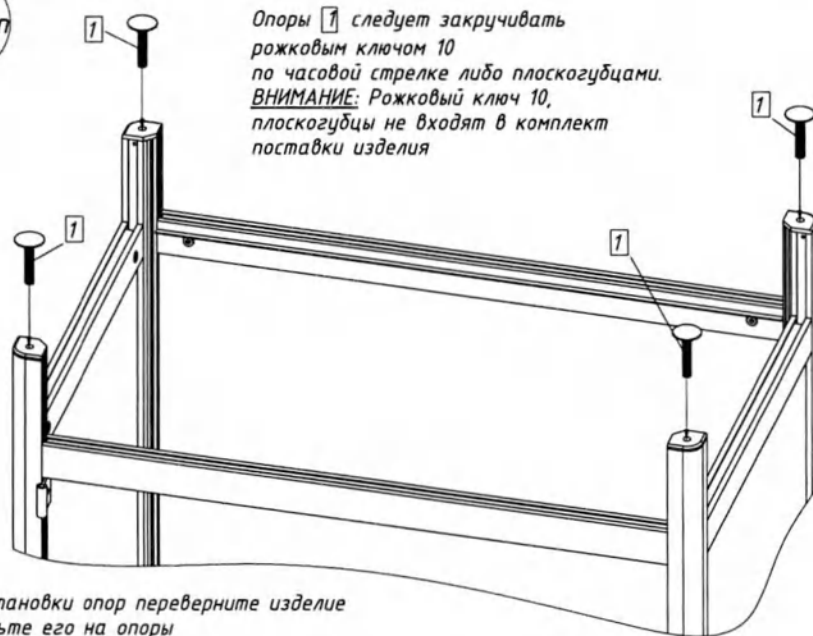

После установки опор переверните изделие и поставьте его на опоры

Собранный каркас шкафа

12 этап

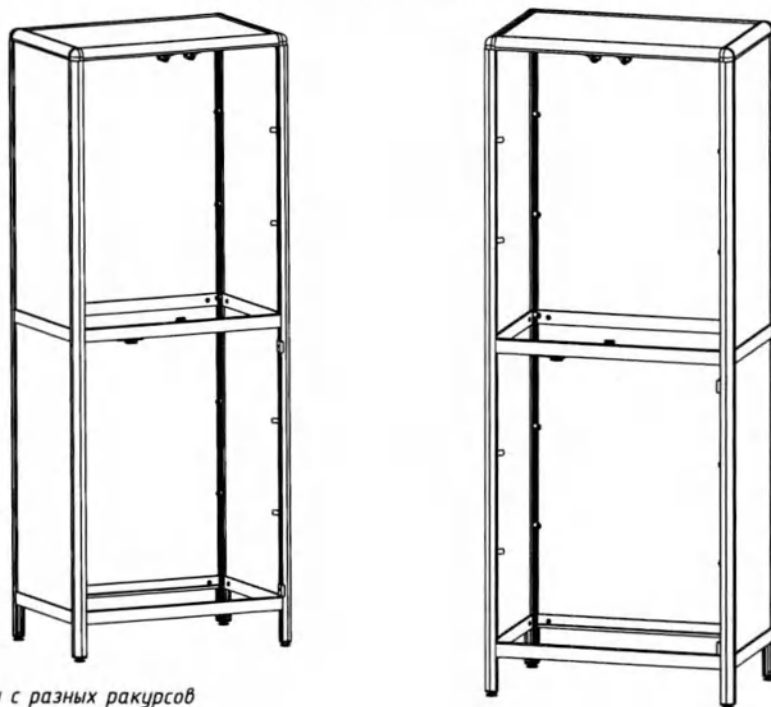

Указаны виды с разных ракурсов



Шкаф медицинский лабораторный (мод.2) в вариантах поставки 1 - 3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13 этап

Mx1 шт.
Hx2 шт.

При установке полок (H) следует учитывать, что большой срезаемый угол, должен располагаться рядом со стенкой задней изделия

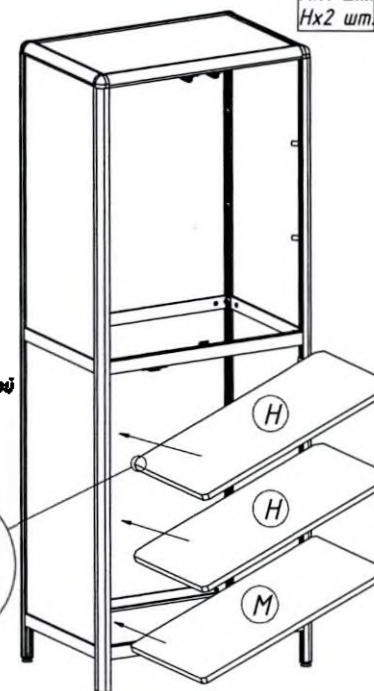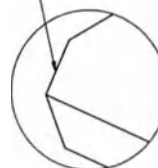


При необходимости положение полок (H) можно менять, путём сдвига (регулировкой) полкодержателей 5 по вертикали

14 этап

Произведите установку полок в верхнее отделение шкафа

Ox3 шт.

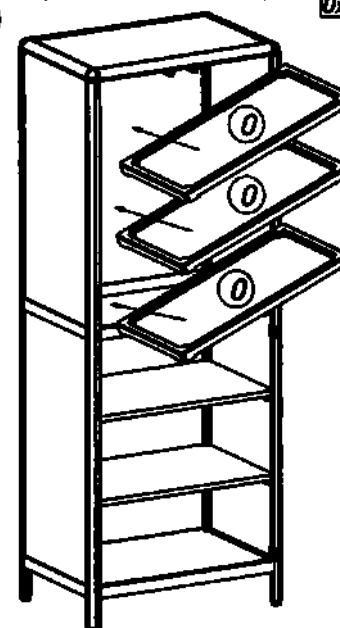


При необходимости положение полок (O) можно менять, путём сдвига (регулировкой) полкодержателей 5 по вертикали

Шкаф медицинский лабораторный (мод.2) в вариантах поставки 1 - 3


ОМ 29.445.01 Произведите сборку двери нижней
Установите ответную планку магнита 18

15 этап

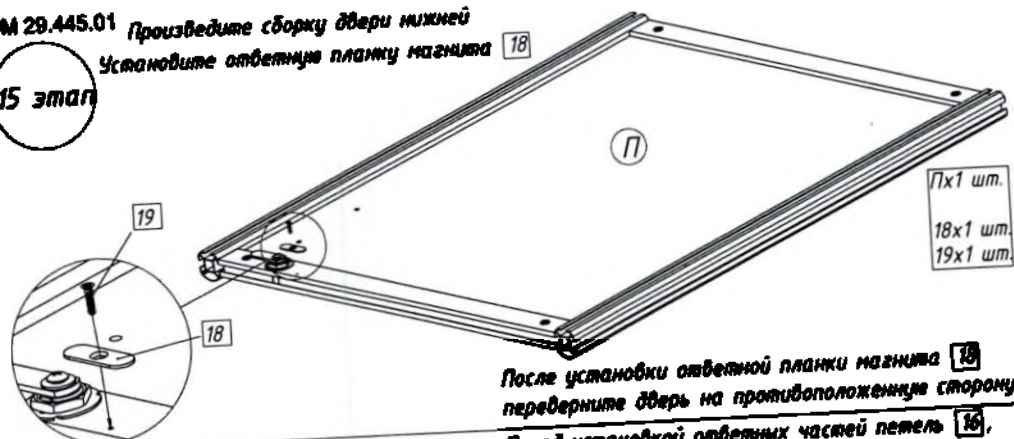


После установки ответной планки магнита 18 переверните дверь на противоположную сторону.
Перед установкой ответных частей петель 16, выверните против часовой стрелки на несколько оборотов фиксирующие винты ключом 22 либо 23

Установите ответные части петель 16

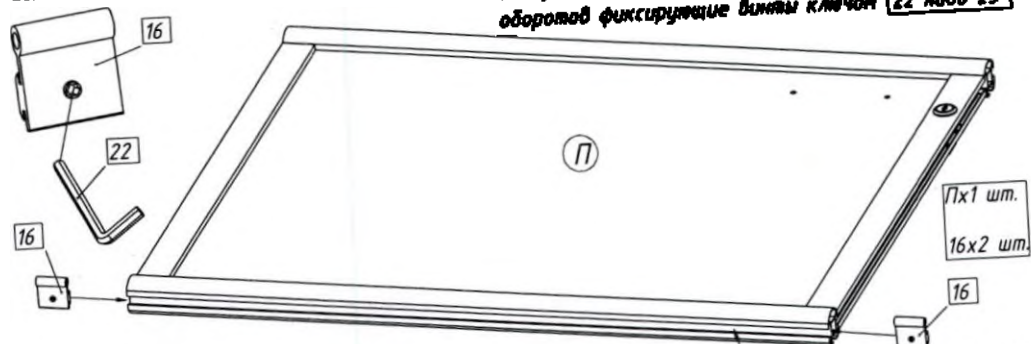


Установив ответные части петель 16, затяните их до ощутимого сопротивления ключом 22 либо 23

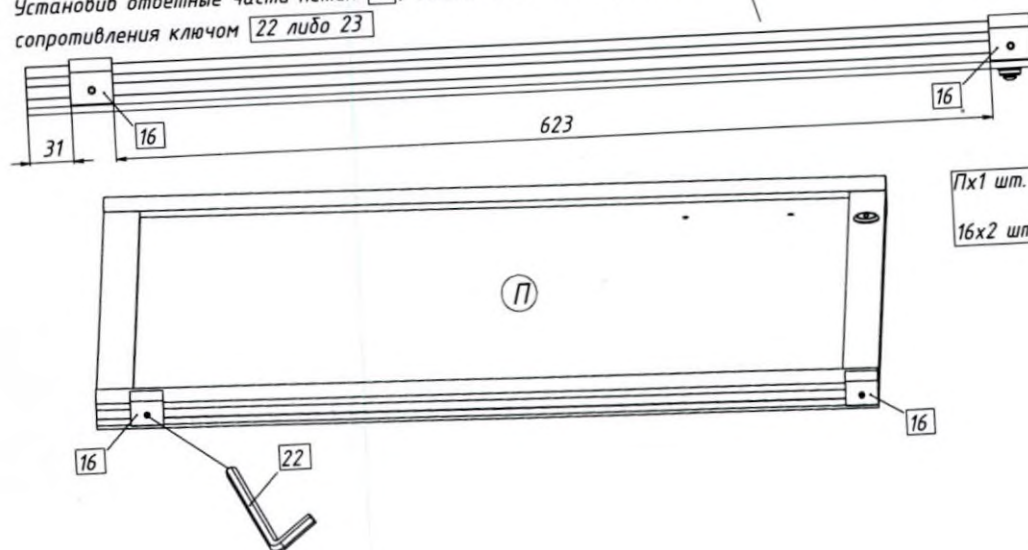

ОМ 29.445.01 Произведите сборку двери нижней

Установите заглушки 15

16 этап

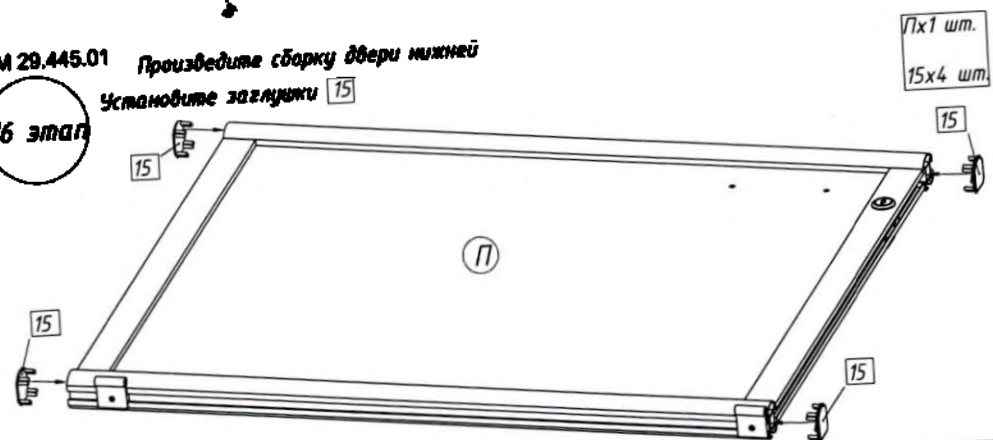

Установите заглушки декоративные 6

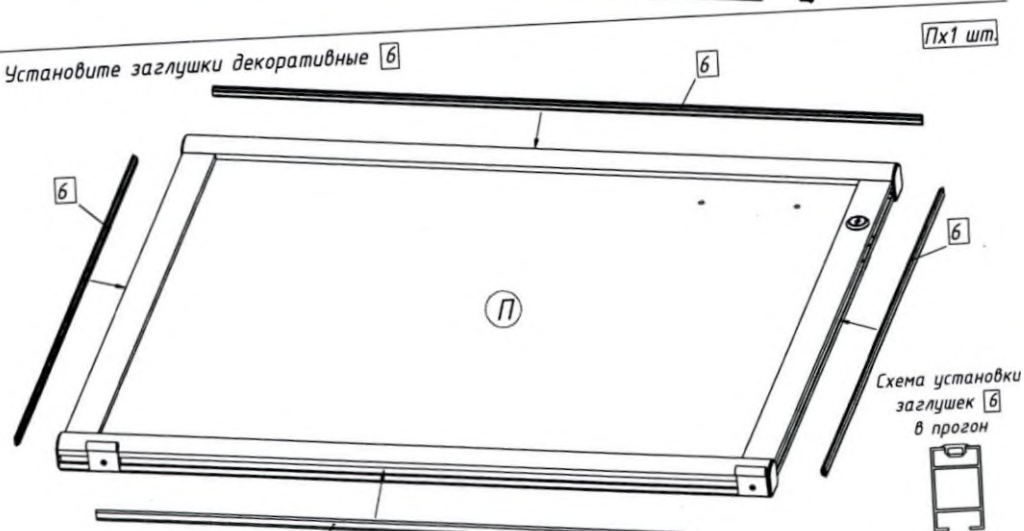


Схема установки заглушек 6 в прогон

Установите заглушки декоративные 6. После установки заглушек декоративных 6 рисунок выше переверните дверь на противоположную сторону

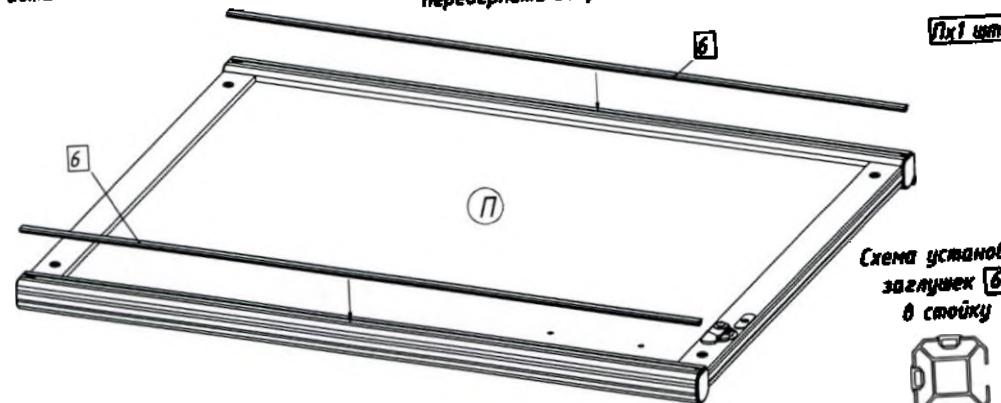


Схема установки заглушек 6 в стойку

Шкаф медицинский лабораторный (мод.2) в вариантах поставки 1 - 3

Шкаф медицинский лабораторный (мод.2) в вариантах поставки 1 - 3

17 этап



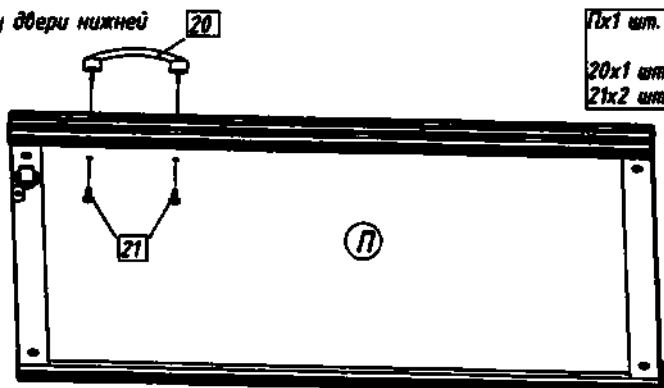


Схема установки двери нижней

1x1 шт.

Произведите установку в каждую петлю

17x2 шт.

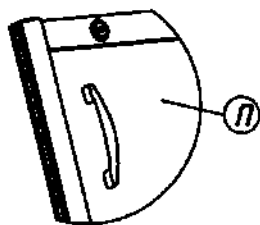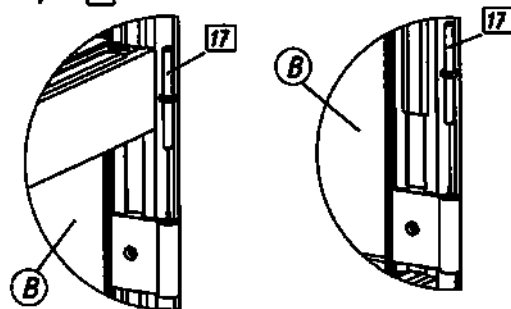

Произведите установку двери



Кх1 шт.

Внимание: Установку двери (К) производить только в вертикальном положении шкафа.

Установленная дверь нижняя

Схема закрытой двери нижней

1x1 шт.

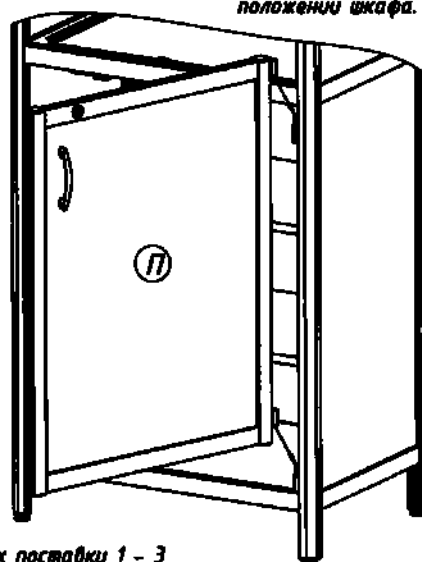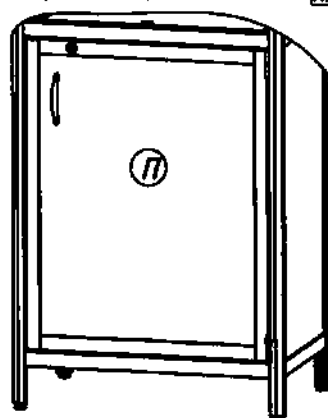


ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание повреждения стеклянных дверей шкафа, их установку рекомендуется выполнять сборщикам в количестве 2-х человек, а так же перед их установкой необходимо проверить:

- винты замков установленных прогонов надежно затянуты, и шкаф не имеет диагональных перекосов;
- наличие в каждой петле (3) пластиковых прокладок и колпачка на затяжных винтах;
- если хотя бы одно из условий не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНА!!!

Схема установки стеклянных дверей верхних

18 этап

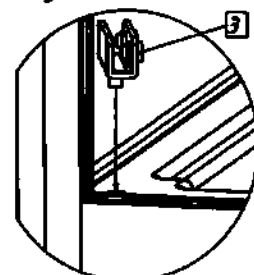


Установив верхние петли (3) и придерживая их от выпадения, вставьте между петлей стеклянные двери без перекосов.

Рх2 шт.



3x4 шт.

Установите нижние петли (3)

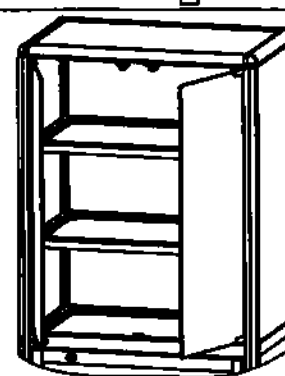

Установленные нижние стеклянные двери

Схема установки стеклянной двери в петлю

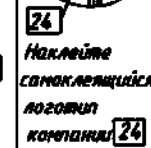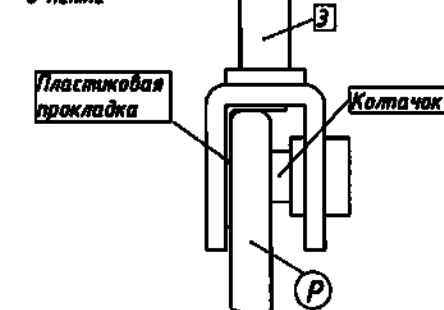

Внимание: Установку стеклянных дверей производить только в вертикальном положении шкафа. После установки стеклянных дверей (Р) необходимо затянуть все фиксирующие винты петель (3) до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов, это может привести к порче стеклянной двери.

19 этап

Схема затяжки винта на ручке 4 стеклянной двери левой



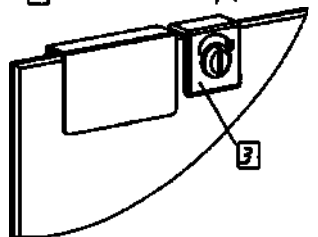


Схема затяжки винта на ручке 4 стеклянной двери правой

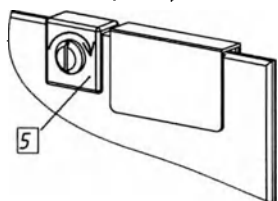


Стеклянные двери в закрытом положении

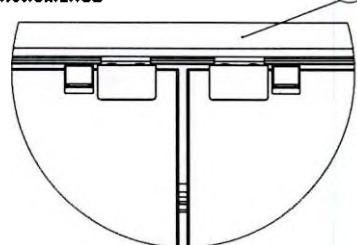

Установив на стеклянные двери накладки для магнитной защёлки 2 и ручки 4, отрегулируйте их положение таким образом, чтобы при закрытых стеклянных дверях (Р) накладки для магнитной защёлки 2 всей поверхностью соприкасались с магнитными защёлками, ручки 4 не препятствовали свободному закрыванию/открыванию стеклянными дверцами (Р). Затяните на ручках фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов на ручках, это может привести к порче стеклянной двери. При необходимости возможна регулировка магнитных защёлок, см. Этап 20


ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения стеклянной двери при установке планок 2 и ручек 4 необходимо убедиться в наличии колпачков на затяжных винтах ручек 4, а так же установленной защитной прокладке, в металлической планке 2. Если защитные элементы будут отсутствовать, установка данных деталей на изделие **ЗАПРЕЩЕНА!**

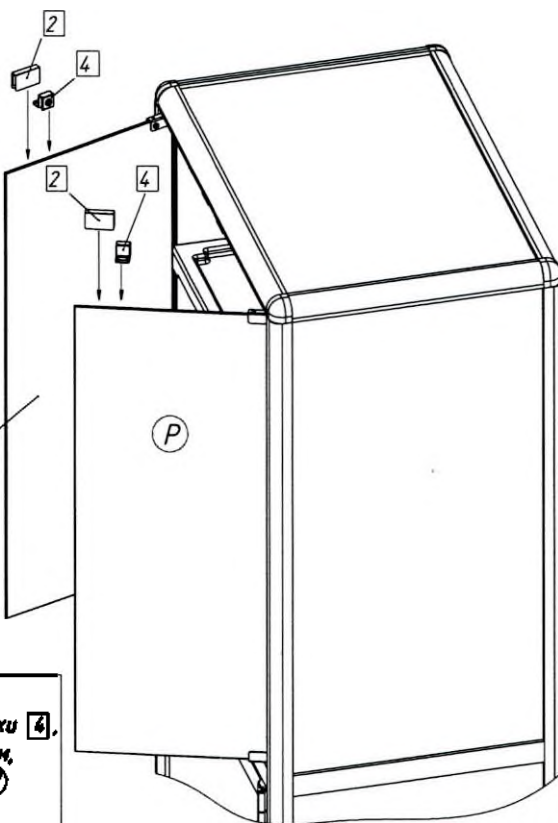
2x2 шт.
4x2 шт.

10x4 шт.


20 этап

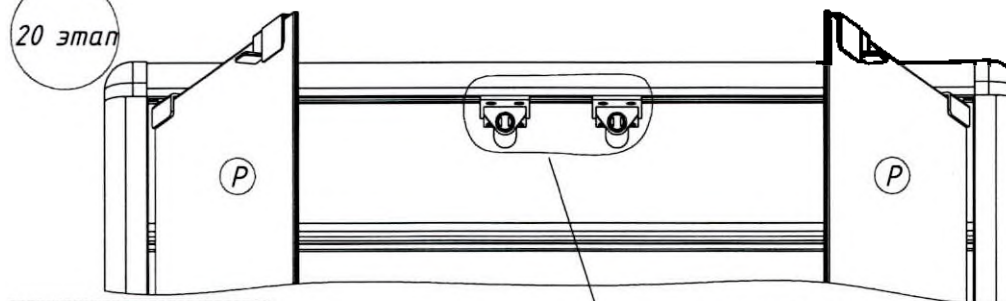

ВНИМАНИЕ: Шило не входит в комплект поставки изделия

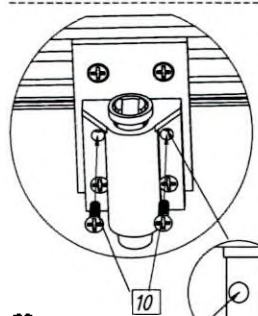

Сделать самостоятельно дополнительное отверстие для установки фиксирующих винтов 10

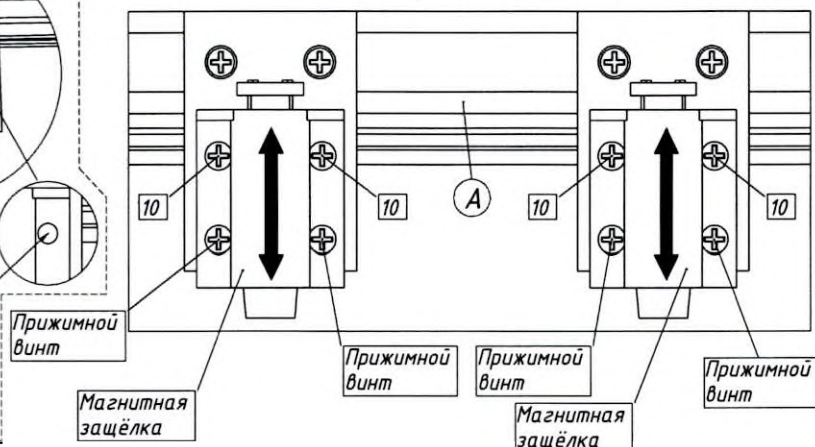

Открыв стеклянные двери (Р) ослабьте при необходимости прижимные винты и сдвиньте в требуемое положение обе магнитные защёлки. По завершению регулировки, затяните на магнитных защёлках прижимные винты до ощутимого сопротивления. В площадке магнитной защёлки сделайте отверстие при помощи «шила» для вкручивания фиксирующих винтов 10 и затяните фиксирующие винты 10. Опасайтесь чрезмерной затяжки прижимных и фиксирующих винтов 10 на каждой из магнитных защёлок, это может привести к порче её корпуса.

Стеклянные двери в закрытом положении



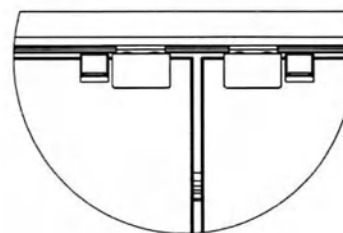


Схема фиксации стеклянных дверей магнитной защёлкой

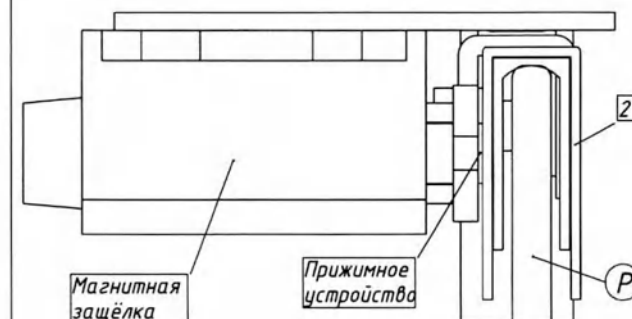

Инструкция по сборке изделия
Шкафы медицинские по ГИКС.942810.107 ТУ

Шкаф медицинский лабораторный (мод.3) в вариантах поставки 1 - 3

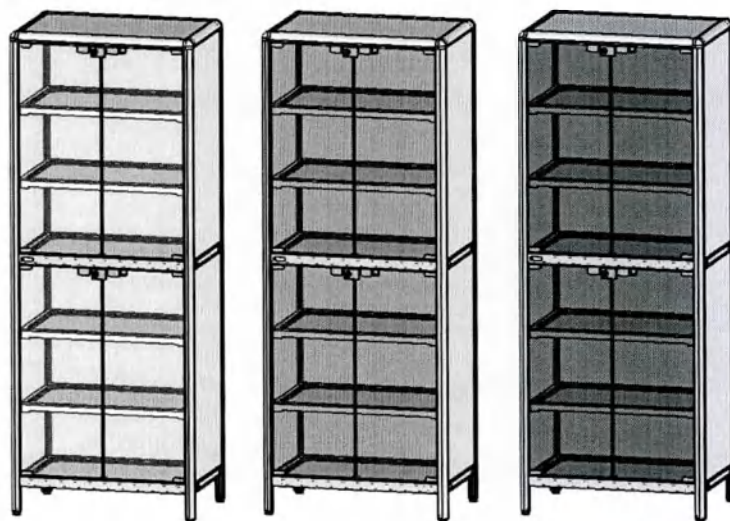

Условные обозначения:

1. А-Н : детали

□ Код товара

□ Код товара

□ Код товара

2. 1 - 15 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 18 : этапы сборки

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Крышка	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Стенка задняя верхняя	1
Д	Прогон задний	2
Е	Стенка задняя нижняя	1
Ж	Прогон средний передний	1
З	Прогон нижний передний	1
И	Заглушка левая прогона и крышки	2
К	Заглушка правая прогона и крышки	2
Л	Заглушка под замок	2
М	Заглушка под ограничитель	2
Н	Полка пластиковая	6
О	Стеклянная дверца	4


Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	4	Опора	
2	4	Накладка для магнитной защёлки	
3	2	Замок	
4	8	Петля	
5	2	Ручка стеклянных дверей	
6	24	Полкодержатель	
7	1	Заглушка декоративная	
8	4	Площадка магнита	
9	8	Саморез 3x16	
10	4	Магнит	
11	10	Саморез 3x12	
12	2	Ограничитель стеклянных дверей	
13	1	Ключ шестигранный малый	
14	1	Ключ шестигранный большой	
15	1	Логотип компании	


Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

ОМ 29.449.01 Произведите сборку крышки Рекомендации для сборки: разложите на твёрдой поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборку деталей и изделия!

1 этап

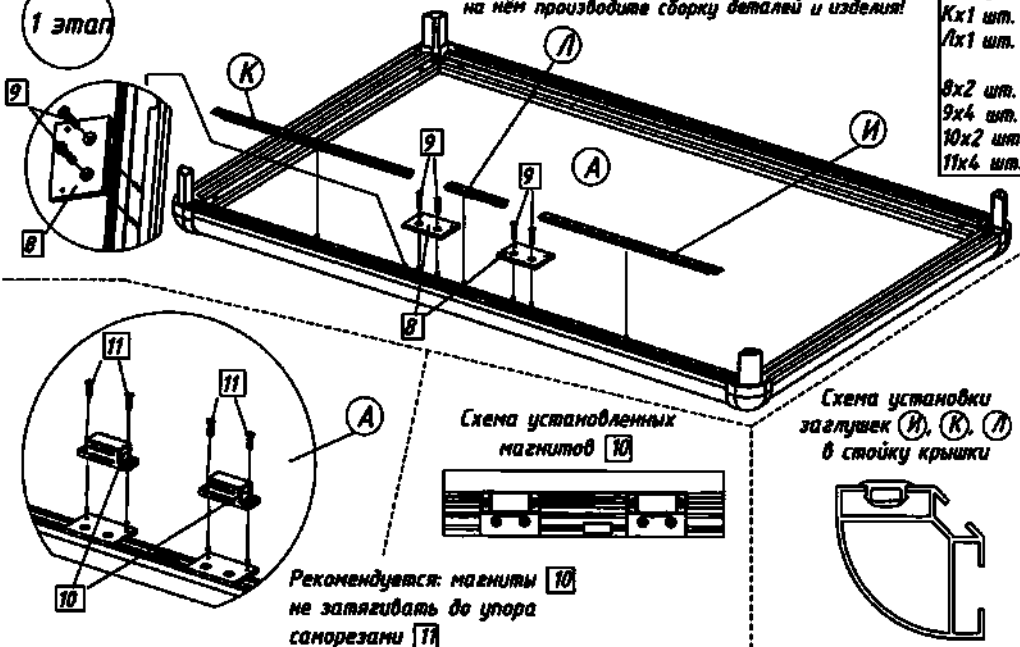

2 этап Произведите сборку прогона среднего переднего

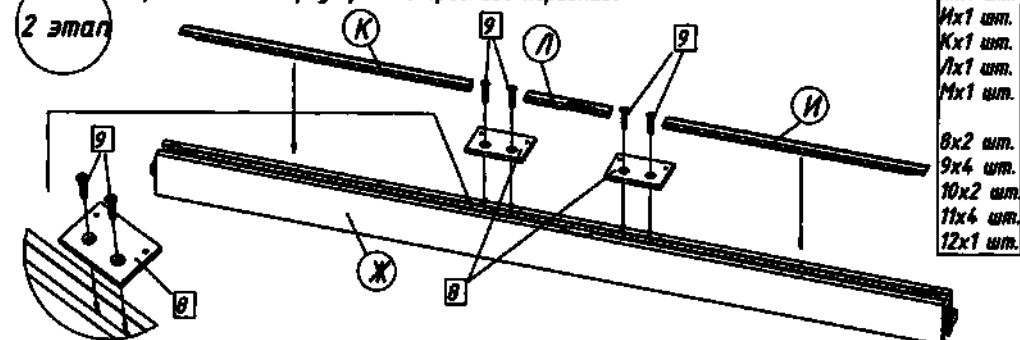


Рекомендуется: магниты 10 не затягивать до упора саморезами 11



ОМ 29.449.01


3 этап

Произведите сборку прогона нижнего переднего

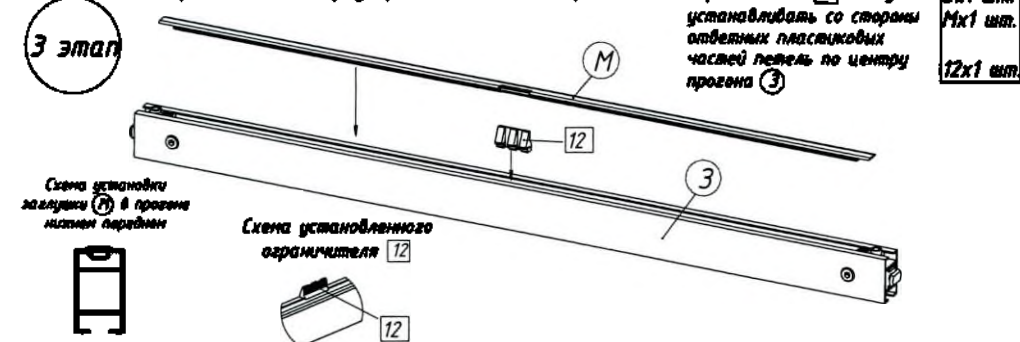

4 этап

Произведите сборку стенки левой

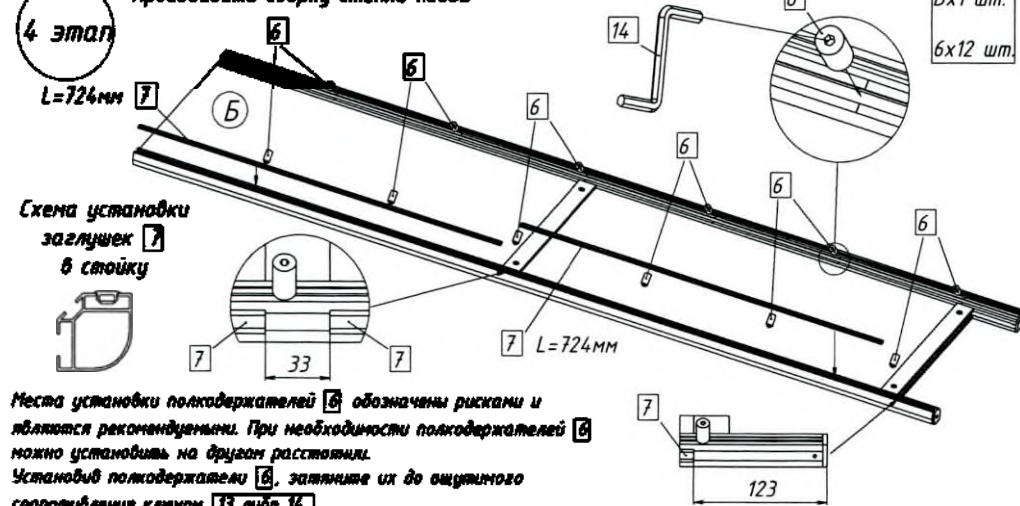

5 этап

Произведите сборку стенки правой

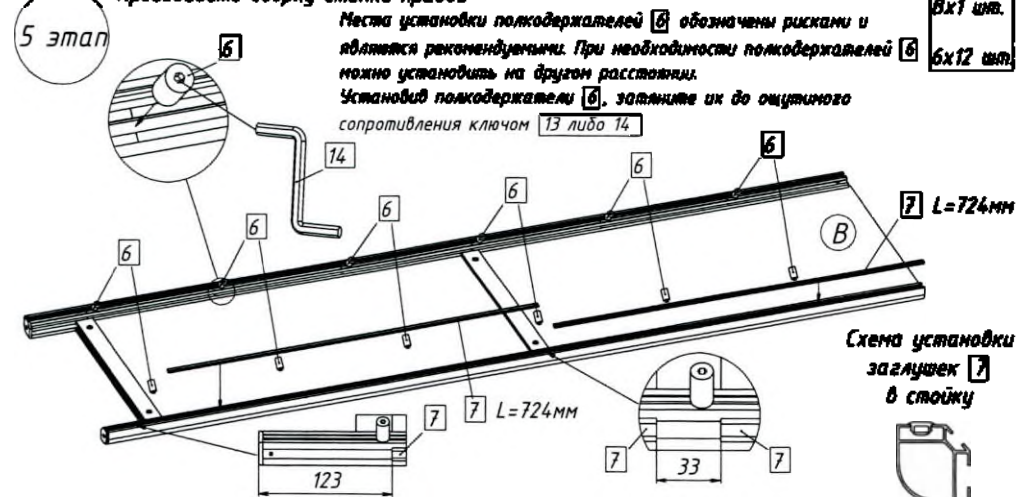


Схема сборки изделия

6 этап

Произведите установку стенок боковых


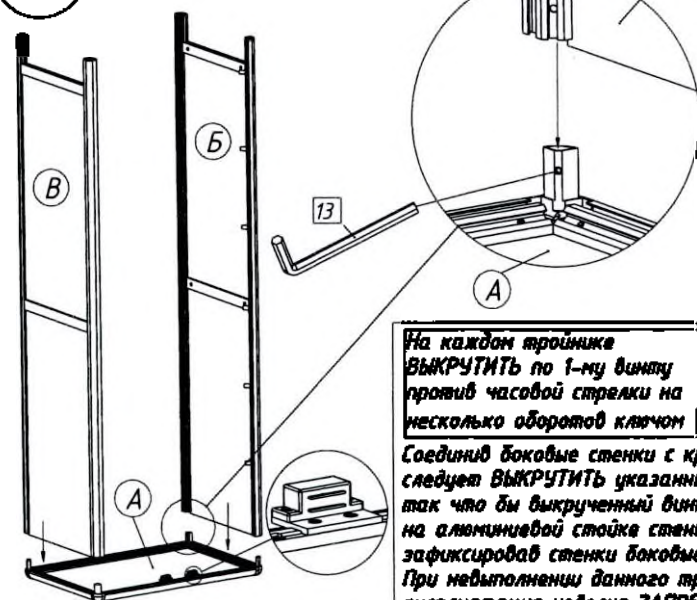


Схема фиксации стенок боковых с крышкой изделия

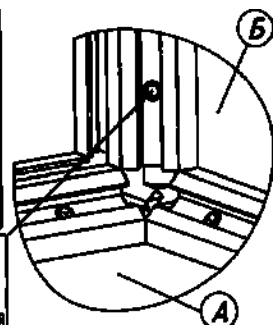

На каждом тройнике **ВЫКРУТИТЬ** по 1-му винту против часовой стрелки на несколько оборотов ключом 13



Соединив боковые стенки с крышкой, обязательно следует **ВЫКРУТИТЬ** указанный винт на каждом тройнике, так что бы выкрученный винт попал в отверстие на алюминиевой стойке стенки боковой, тем самым зафиксировав стенки боковые с крышкой. При невыполнении данного требования, эксплуатация изделия **ЗАПРЕЩЕНА!**

Ах1 шт.
Бх1 шт.
Вх1 шт.

7 этап

Произведите установку стенок и прогонов задних

Схема установки прогонов

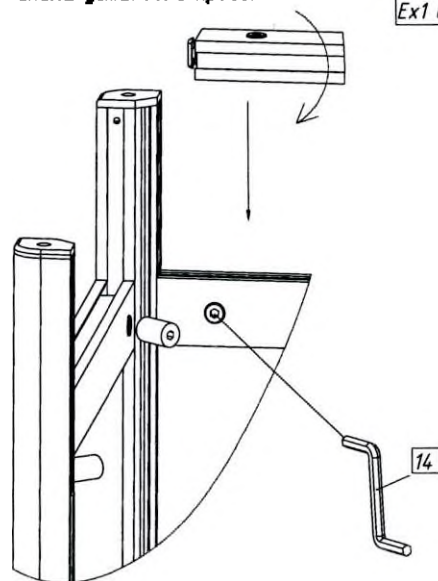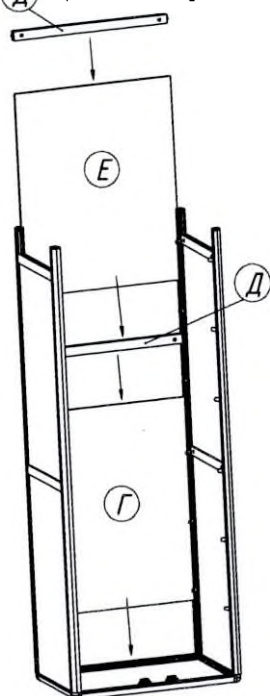


Установив прогоны (Д), затяните фиксирующие замки до ощутимого сопротивления ключом 14

Гх1 шт.
Дх2 шт.
Ех1 шт.

Произведите установку прогонов передних


8 этап

Перед установкой прогонов (Ж) и (З), вытащите края заглушек декоративных из пазов стенок боковых (Б) и (В), после установки прогонов (Ж) и (З), вставьте обратно заглушки в пазы профилей

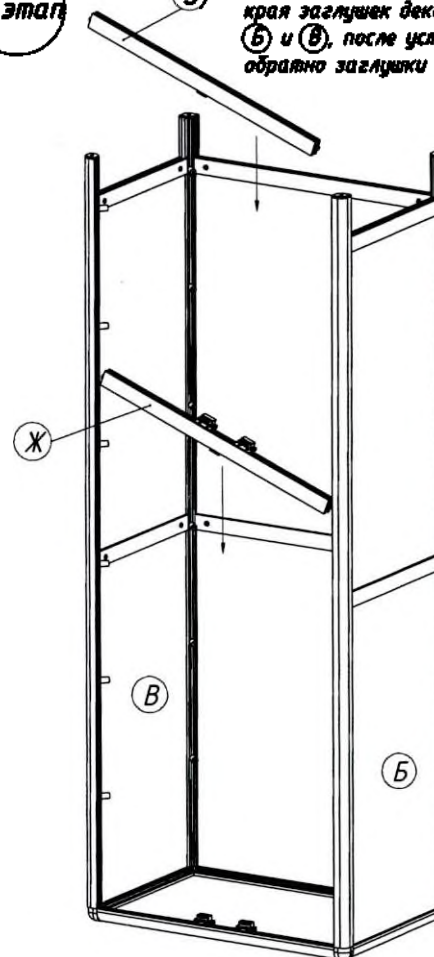

Нижний прогон

Средний прогон

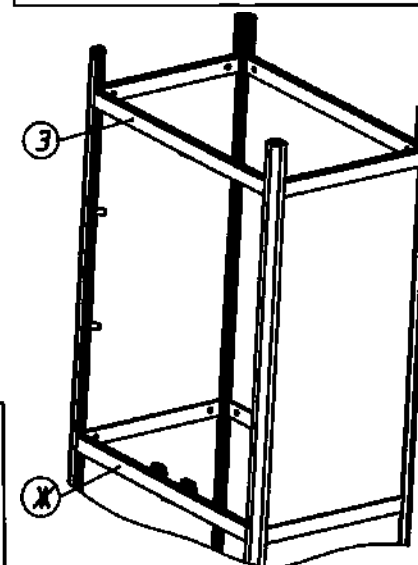

Установив прогоны (Ж) и (З), затяните фиксирующие замки до ощутимого сопротивления ключом 14

Прогон нижний передний (З) должен быть выровнен с нижними прогонками боковых стенок (Б) и (В). Прогон средний передний (Ж) должен быть выровнен со средними прогонками боковых стенок (Б) и (В). В результате прогоны (Ж) и (З) должны находиться на одном уровне с нижними и средними прогонками стенок боковых (Б) и (В).

Жх1 шт.
Зх1 шт.

ОМ 29.449.01


Произведите установку опор путём вкручивания их по часовой стрелке

9 этап



Опоры 1 следует закручивать рожковым ключом 10 по часовой стрелке либо плоскогубцами. **ВНИМАНИЕ:** Рожковый ключ 10, плоскогубцы не входят в комплект поставки изделия



1x4 шт.

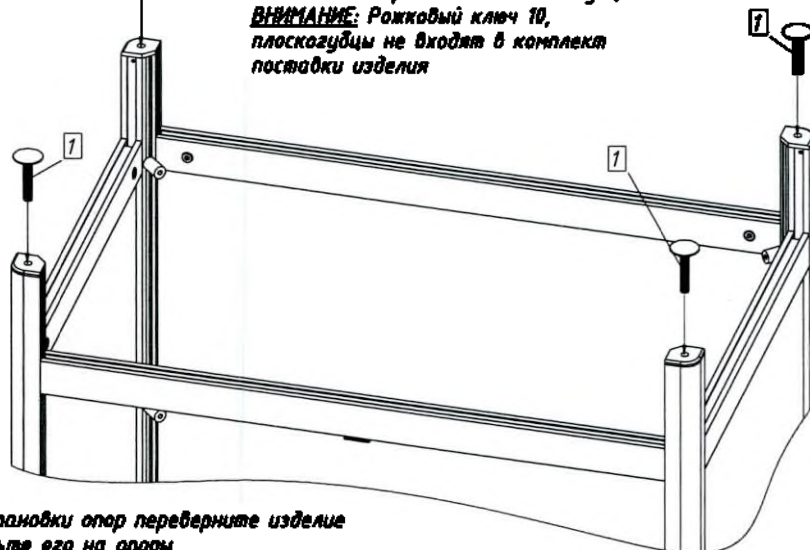

После установки опор переверните изделие и поставьте его на опоры

Собранный каркас шкафа

10 этап

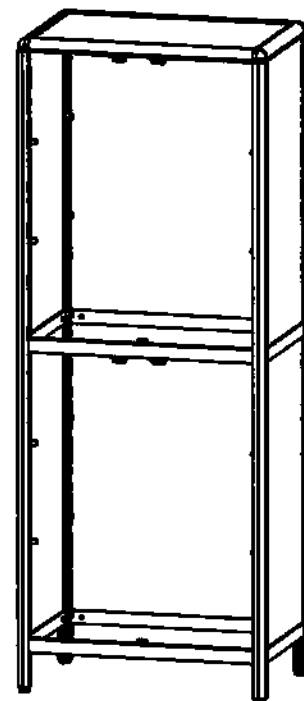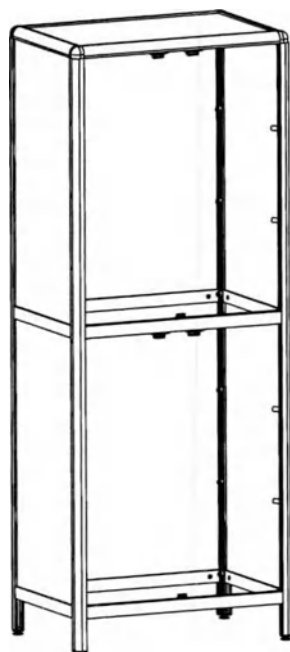


Указаны виды с разных ракурсов

ОМ 29.449.01


Произведите установку полок в нижнее отделение шкафа

11 этап

1x3 шт.

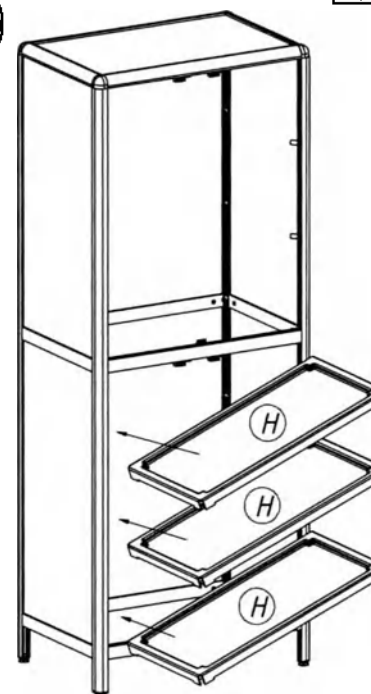


При необходимости положение полок (H) можно менять, путём смещения (регулировкой) полкодержателей 6 по вертикали

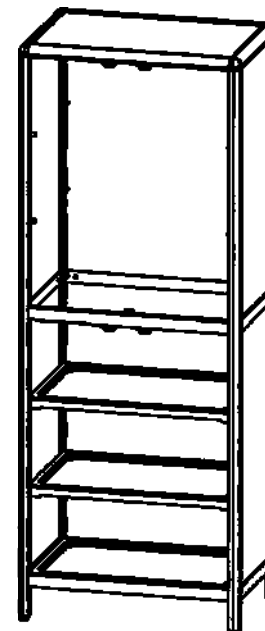


12 этап

Произведите установку полок в верхнее отделение шкафа

1x3 шт.

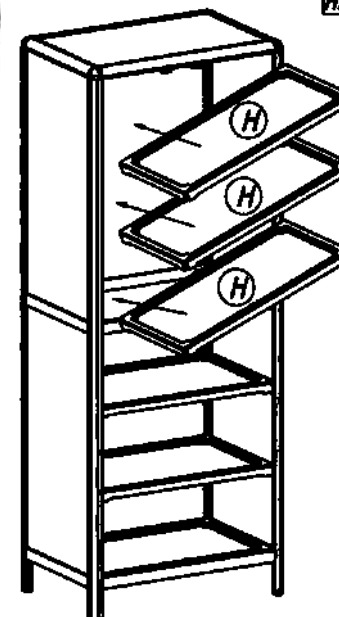

При необходимости положение полок (H) можно менять, путём смещения (регулировкой) полкодержателей 6 по вертикали

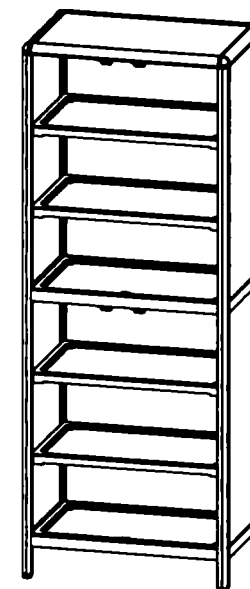


ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения стеклянных дверей шкафа, их установку рекомендуется выполнять сборщикам в количестве 2-х человек, а так же перед их установкой необходимо проверить:

- винты замков установленных прогонов надежно затянуты, и шкаф не имеет диагональных перекосов;
- наличие в каждой петле 4 пластиковых прокладок и колпачков на затяжных винтах;
- если хотя бы одно из условий не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия **ЗАПРЕЩЕНА!**


Схема установки стеклянных дверей нижних

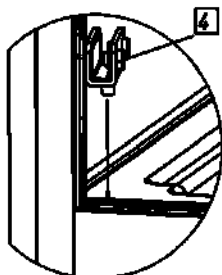13 этап

Установив верхние петли 4 и придерживая их от выпадения, вставьте между петлей стеклянные двери без перекосов.


0x2 шт.
4x4 шт.

Установите нижние петли 4

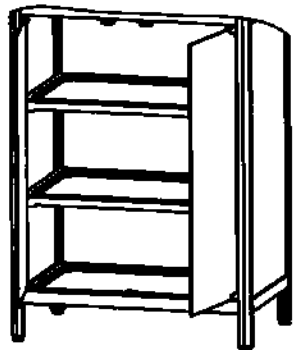

Установленные нижние стеклянные двери

Схема установки стеклянной двери в петлю

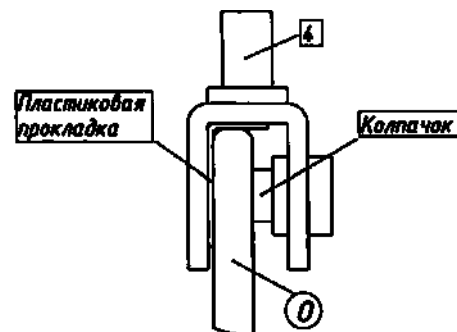

Внимание: Установку стеклянных дверей производить только в вертикальном положении шкафа. После установки стеклянных дверей 0 необходимо затянуть все фиксирующие винты петель 4 до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов, это может привести к порче стеклянной двери.

Произведите установку замка, металлических планок и ручки на нижние стеклянные двери

2x2 шт.
3x1 шт.
5x1 шт.

14 этап

Схема затяжки винтов на замке 3 стеклянной двери левой



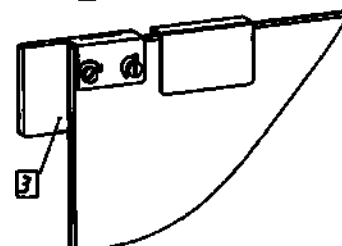


Схема затяжки винтов на ручке 5 стеклянной двери правой

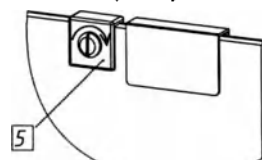


Стеклянные двери в закрытом положении

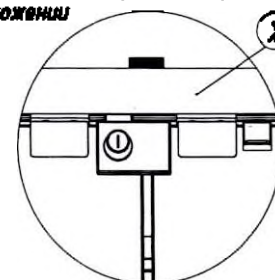



Установив на стеклянные двери замок 3, накладки для магнитной защёлки 2 и ручки 5, отрегулируйте их положение таким образом, что бы при закрытых стеклянных дверях 0 язычок замка 3 попадал в паз среднего прогона X, накладки для магнитной защёлки 2 всей поверхностью соприкасались с магнитами, ручка 5 не препятствовала свободному закрыванию/открыванию стеклянным дверям 0. Затяните на замке и ручке фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов на замке и ручке, это может привести к порче стеклянной двери. При необходимости возможна регулировка магнитов, см. Этап 15

ВНИМАНИЕ!
Во избежание повреждения стеклянной двери при установке замка 3, планок 2 и ручки 5 необходимо убедиться в наличии колпачков на затяжных винтах замка 3 и ручки 5, а так же установленной защитной прокладке, в металлической планке 2. Если защитные элементы будут отсутствовать, установка данных деталей на изделие **ЗАПРЕЩЕНА!**

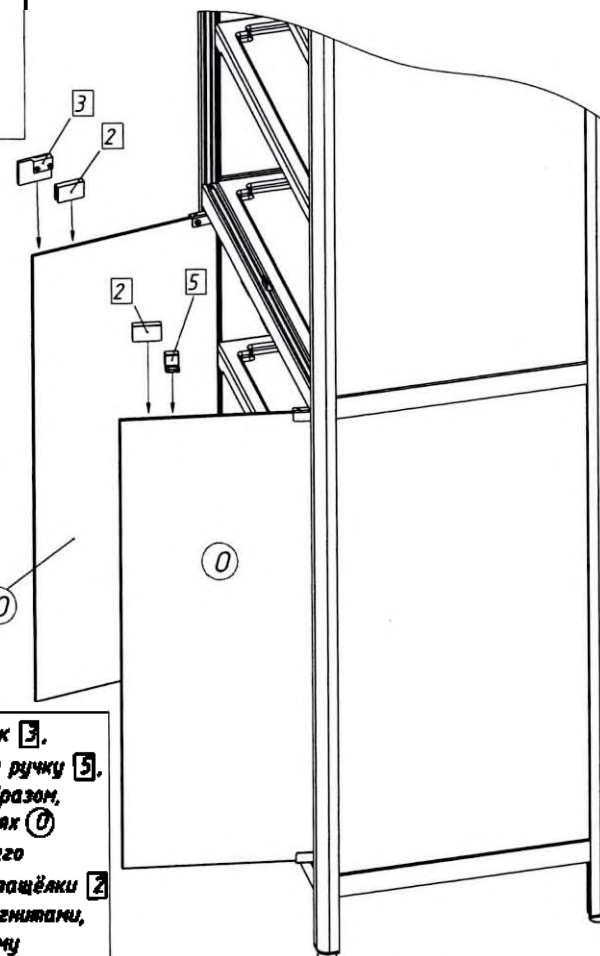

Ответную планку замка 3, входящую в комплект поставки, в изделии не использовать

15 этап

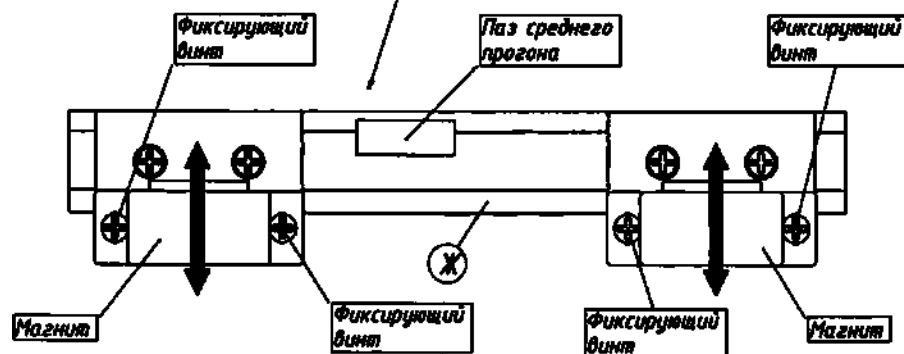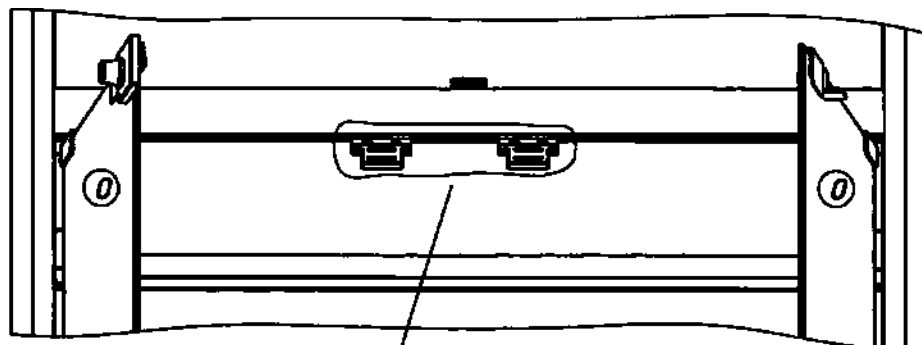

Открыв стеклянные двери (1) ослабьте при необходимости фиксирующие винты и сдвиньте в требуемое положение оба магнита. По завершении регулировки, затяните на магнитах фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки фиксирующих винтов на каждом из магнитов, это может привести к порче его корпуса.

Стеклянные двери в закрытом положении


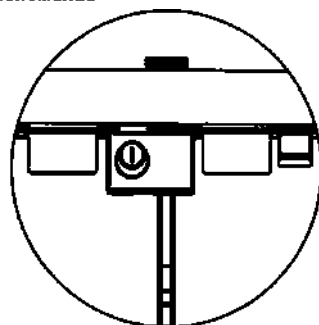


Схема фиксации стеклянных дверей магнитом

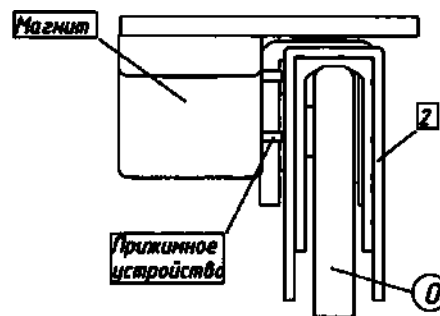


ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения стеклянных дверей шкафа, их установку рекомендуется выполнять сборщикам в количестве 2-х человек, а так же перед их установкой необходимо проверить:

- винты замков установленных прогонов надежно затянуты, и шкаф не имеет диагональных перекосов;
- наличие в каждой петле (4) пластиковых прокладок и колпачков на затяжных винтах;
- если хотя бы одно из условий не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНА!

16 этап


Схема установки стеклянных дверей верхних

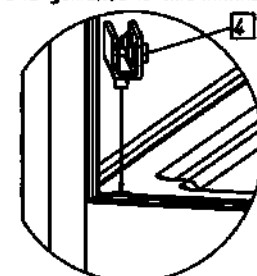

Установив верхние петли (4) и придерживая их от выпадения, вставьте между петель стеклянные двери без перекосов.


0x2 шт.
4x4 шт.

Установите нижние петли (4)

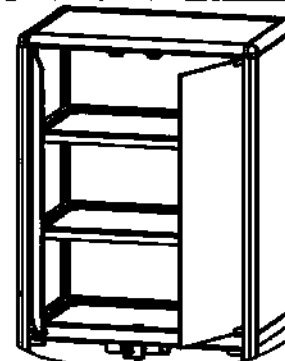

Установленные верхние стеклянные двери

Схема установки стеклянной двери в петлю

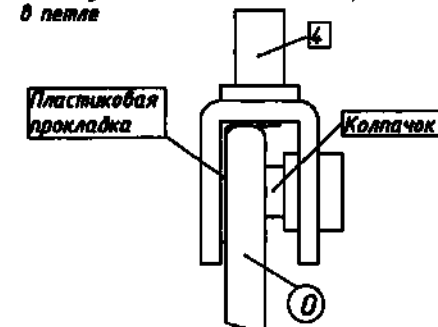

Наклейте самоклеющийся логотип компании (15)



Внимание: Установку стеклянных дверей производить только в вертикальном положении шкафа. После установки стеклянных дверей (1) необходимо затянуть все фиксирующие винты петель (4) до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов, это может привести к порче стеклянной двери.

17 этап

Схема затяжки винтов

на замке 3 стеклянной двери левой



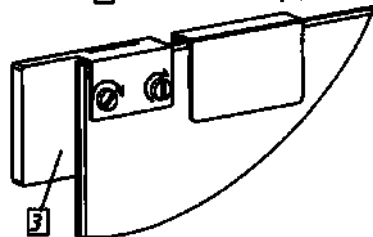


Схема затяжки винтов на ручке 5

стеклянной двери правой

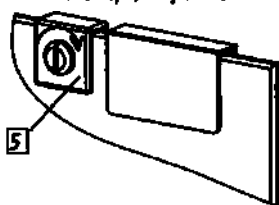

Стеклянные двери в закрытом положении

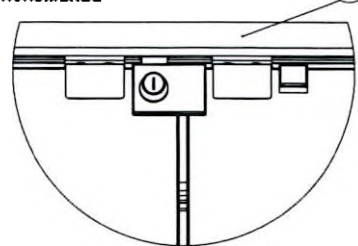


Установив на стеклянные двери замок 3, накладки для магнитной защёлки 2 и ручку 5, отрегулируйте их положение таким образом, чтобы при закрытых стеклянных дверях 0 язычок замка 3 попадал в паз верхнего прогона крышки (А), накладки для магнитной защёлки 2 всей поверхностью соприкасались с магнитами, ручка 5 не препятствовала свободному закрыванию/открыванию стеклянным дверям 0. Затяните на замке и ручке фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов на замке и ручке, это может привести к порче стеклянной двери. При необходимости возможна регулировка магнитов, см. Этап 18

ВНИМАНИЕ!



Во избежание повреждения стеклянной двери при установке замка 3, планок 2 и ручки 5 необходимо убедиться в наличии колпачков на затяжных винтах замка 3 и ручки 5, а так же установленной защитной прокладке, в металлической планке 2. Если защитные элементы будут отсутствовать, установка данных деталей на изделие ЗАПРЕЩЕНА!

2x2 шт.
3x1 шт.
5x1 шт.

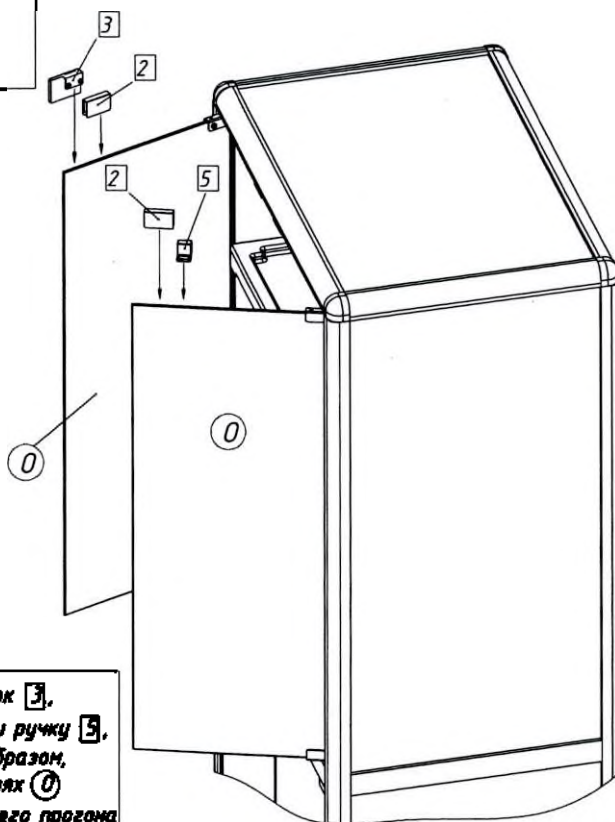

Ответную планку замка 3, входящую в комплект поставки, в изделие не использовать

18 этап

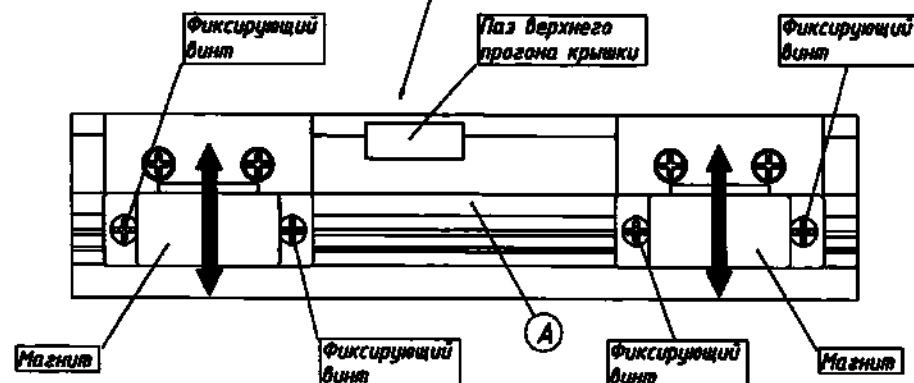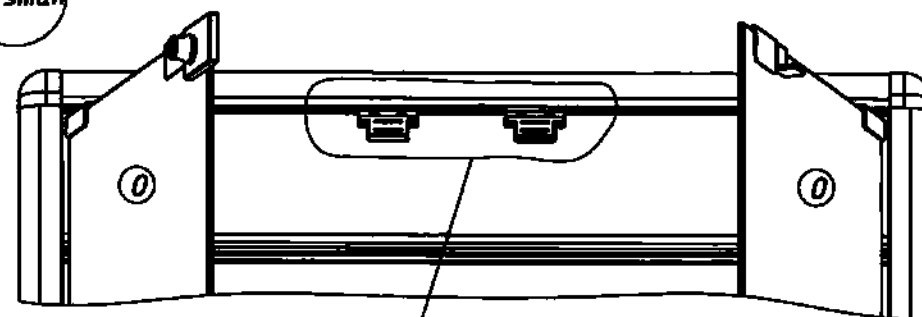

Открыв стеклянные двери 0 ослабьте при необходимости фиксирующие винты и сдвиньте в требуемое положение оба магнита. По завершению регулировки, затяните на магнитах фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки фиксирующих винтов на каждом из магнитов, это может привести к порче его корпуса.

Стеклянные двери в закрытом положении



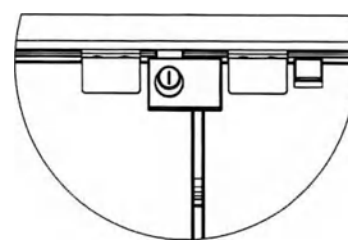


Схема фиксации стеклянных дверей магнитом

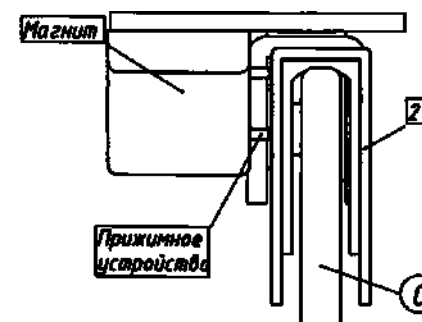

Инструкция по сборке изделия
Шкафы медицинские по ГИКС.942810.107 ТУ
Шкаф медицинский лабораторный (мод.4)

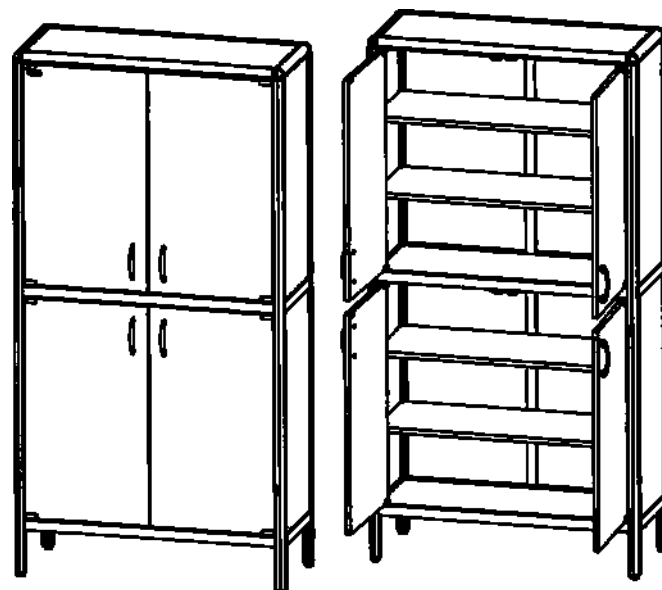

Условные обозначения:

1. А-Г : детали

2. 1 - 12 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 15 : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Крышка	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Стенка задняя	3
Д	Стенка задняя с этикеткой	1
Е	Прогон задний вертикальный	1
Ж	Прогон передний средний	1
З	Прогон передний нижний	1
И	Заглушка декоративная крышки боковая	4
К	Заглушка декоративная прогона среднего/нижнего	2
Л	Прогон задний нижний	1
М	Прогон задний средний	2
Н	Дно/полка средняя	2
О	Полка	4
П	Дверь левая нижняя	1
Р	Дверь правая нижняя	1
С	Дверь левая верхняя	1
Т	Дверь правая верхняя	1


Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	4	Опора	
2	4 комплекта	Петля для дверей из ЛДСП	
3	4	Ответная планка магнита	
4	4 комплекта	Ручка мебельная	
5	12	Саморез 3x12	
6	16	Полкодержатель	
7	1	Заглушка декоративная	
8	4	Площадка магнита	
9	8	Саморез 3x16	
10	4	Защёлка магнитная	
11	1	Логотип компании	
12	1	Ключ шестигранный малый	
13	1	Ключ шестигранный большой	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

ОМ 29.741.01 Произведите сборку крышки Рекомендации для сборки: разложите на твёрдой поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборку деталей и изделия!

1 этап

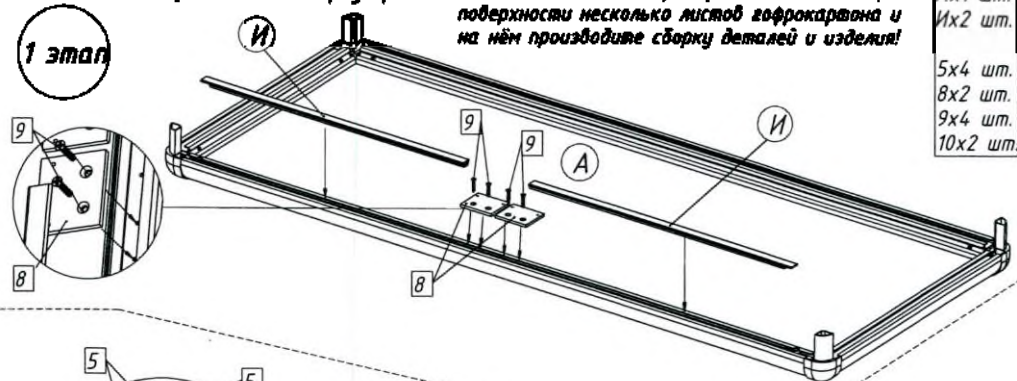

4x1 шт.
1x2 шт.
5x4 шт.
8x2 шт.
9x4 шт.
10x2 шт.

Схема установленных магнитов 10




Рекомендуется: магниты 10 не затягивать до упора саморезами 5

Схема установки заглушек (И) в стойку крышки



2 этап Произведите сборку прогона среднего переднего

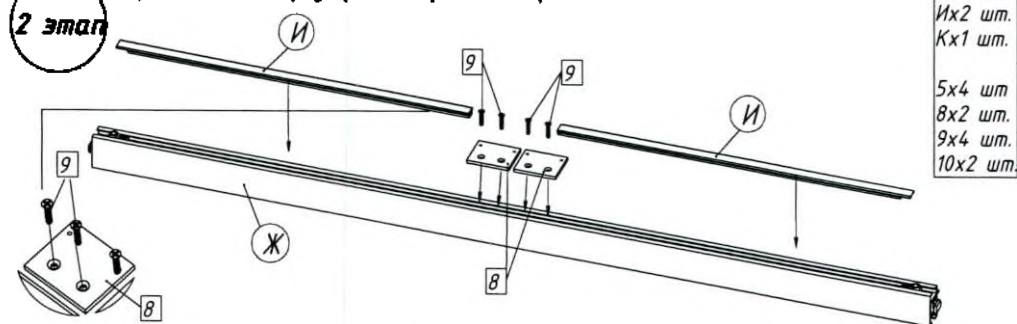

Жx1 шт.
Иx2 шт.
Кx1 шт.
5x4 шт.
8x2 шт.
9x4 шт.
10x2 шт.

Рекомендуется: магниты 10 не затягивать до упора саморезами 5

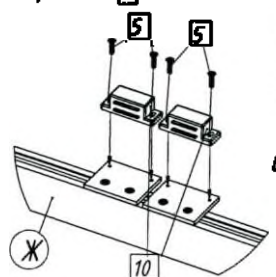


Схема установленных магнитов 10

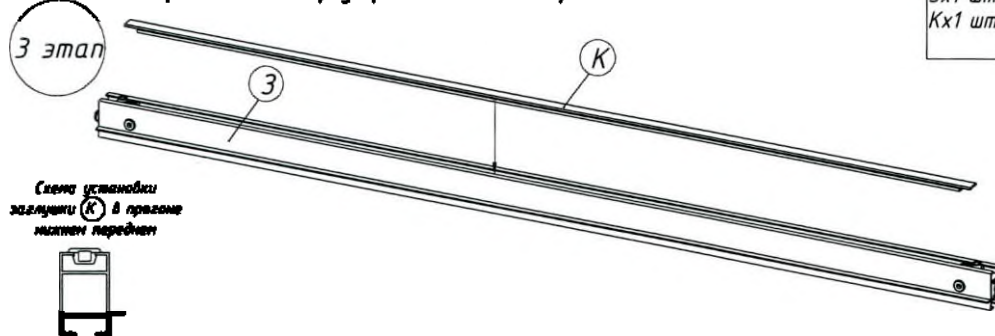


Схема установки заглушек (И, К) в прогон средний передний



ОМ 29.741.01 Произведите сборку прогона нижнего переднего

3 этап




3x1 шт.
Кx1 шт.

Схема установки заглушки (К) в прогон нижний передний



4 этап Произведите сборку стенки левой

4 этап

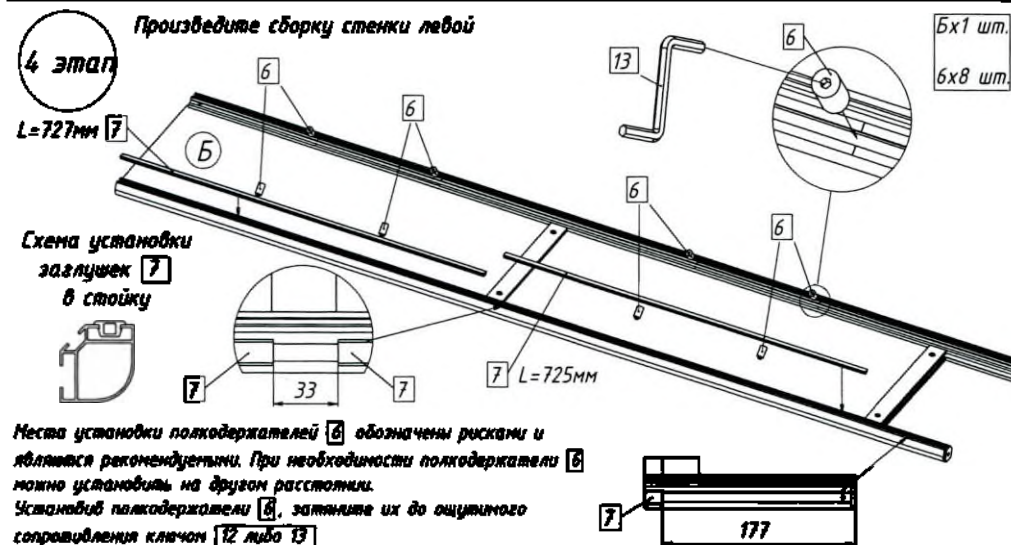

Бx1 шт.
6x8 шт.


Схема установки заглушек 7 в стойку



Места установки полокдержателей 6 обозначены рисками и являются рекомендуемыми. При необходимости полокдержатели 6 можно установить на другом расстоянии. Установив полокдержатели 6, затяните их до ощутимого сопротивления ключом 12 либо 13

Произведите сборку стенки правой

5 этап

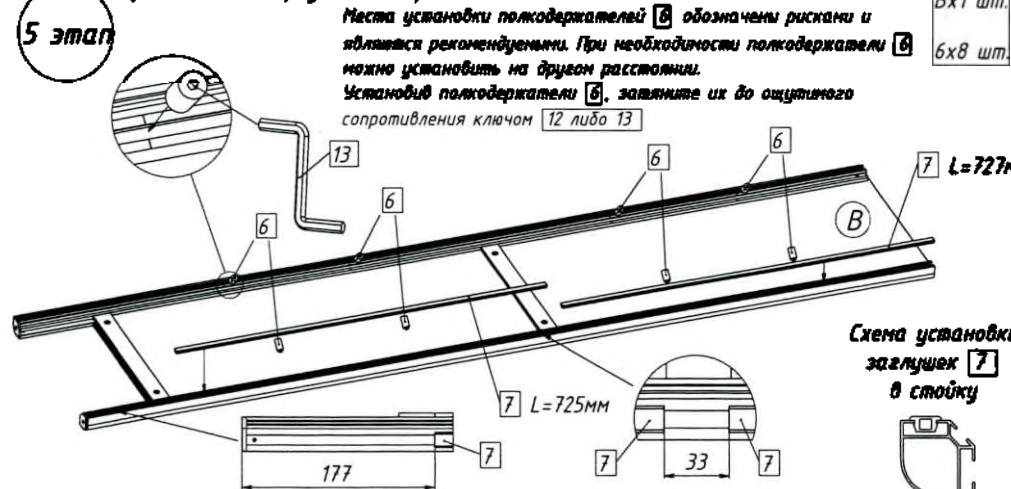


Вx1 шт.
6x8 шт.


Схема установки заглушек 7 в стойку




Схема сборки изделия

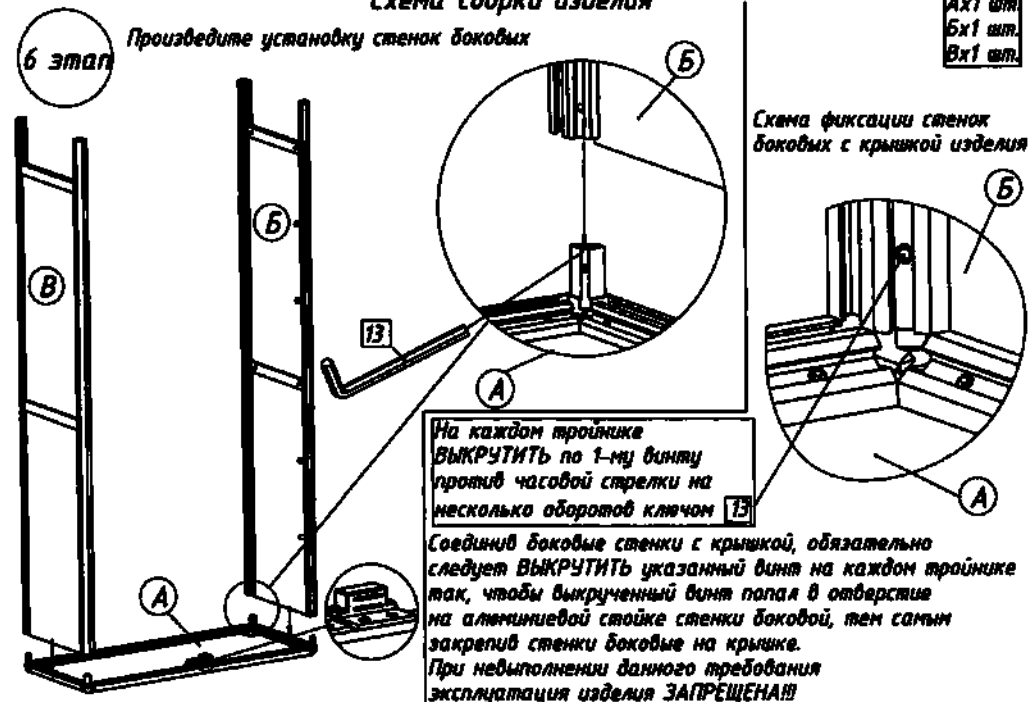

Произведите установку стенок и прогонов задних

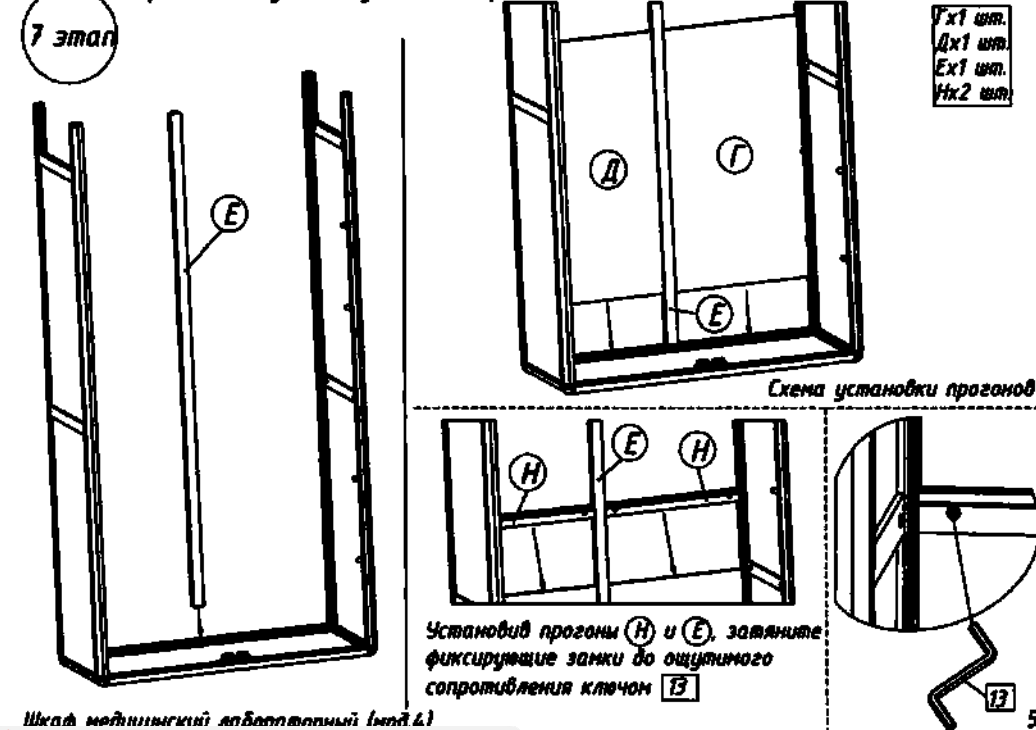

Произведите установку прогонов передних и заднего нижнего

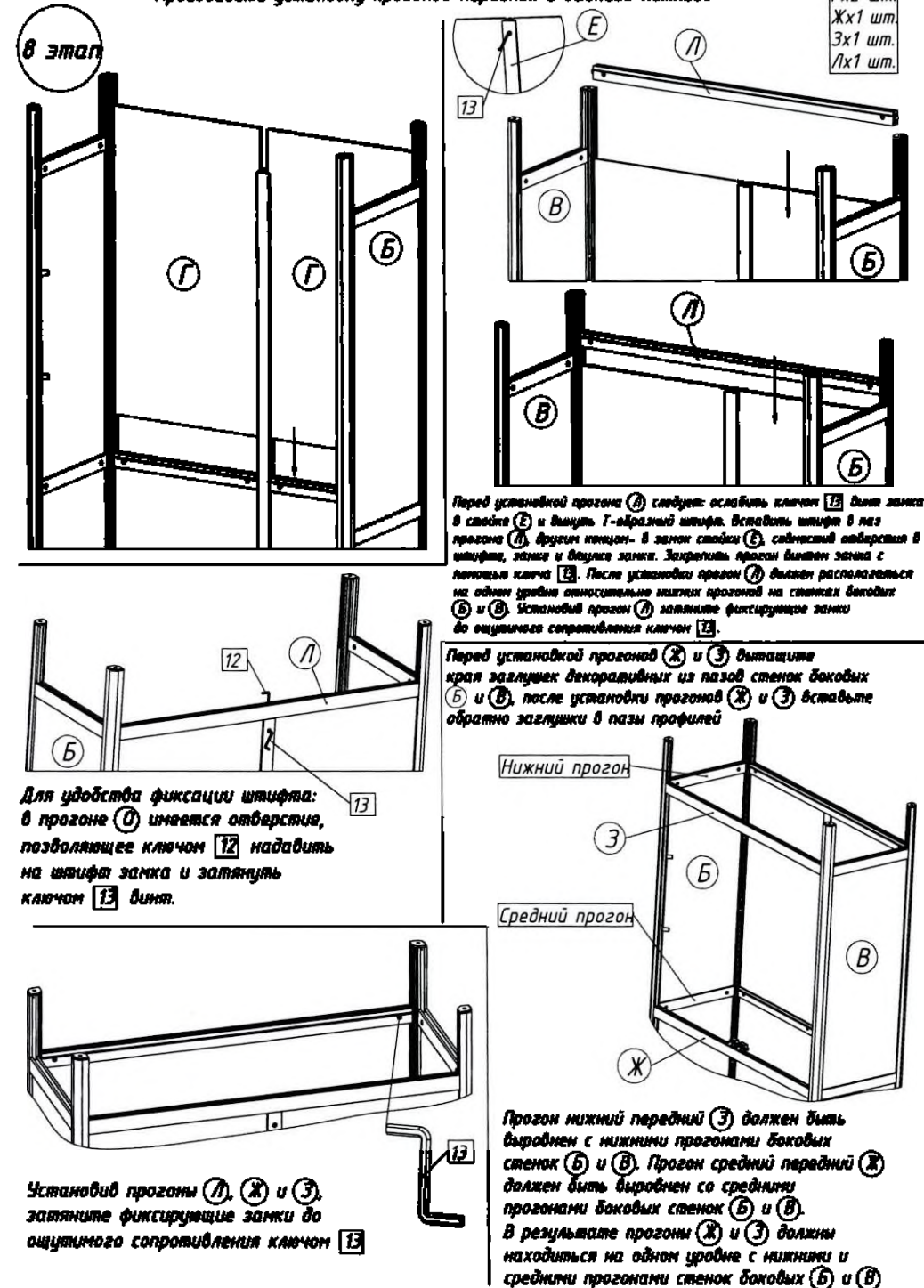


ОМ 29.741.01

Произведите установку опор путём вкручивания их по часовой стрелке, а так же установите заглушки

1x4 шт.


9 этап

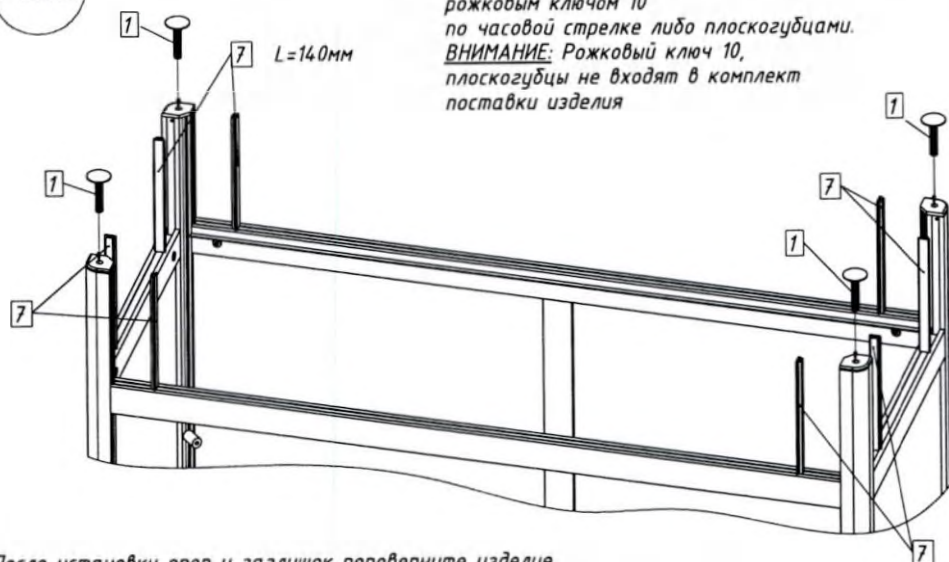

После установки опор и заглушек переверните изделие и поставьте его на опоры

Собранный каркас шкафа

10 этап

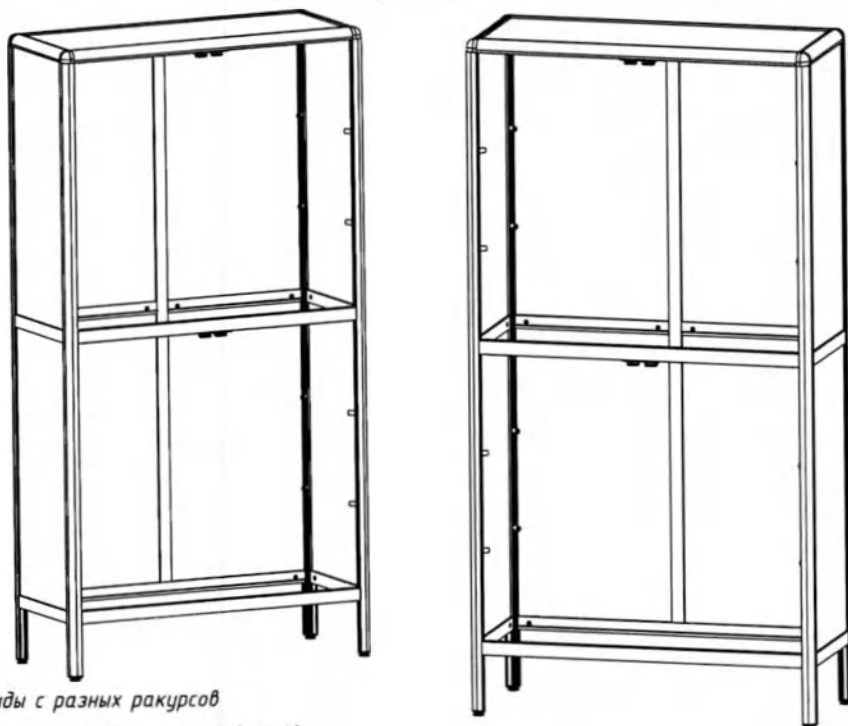


Указаны виды с разных ракурсов

ОМ 29.741.01

Произведите установку полок в нижнее отделение шкафа

Hx1 шт.
Ox2 шт.

11 этап

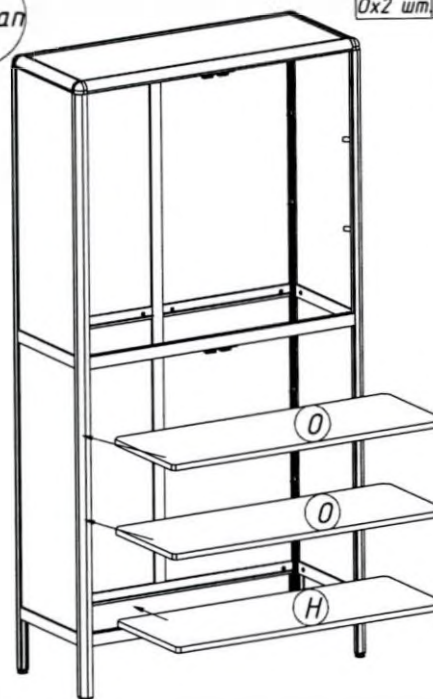


При необходимости положение полок (H) можно менять путём смещения (регулировкой) полкодержателей [6] по вертикали

Произведите установку полок в верхнее отделение шкафа

Hx1 шт.
Ox2 шт.

12 этап

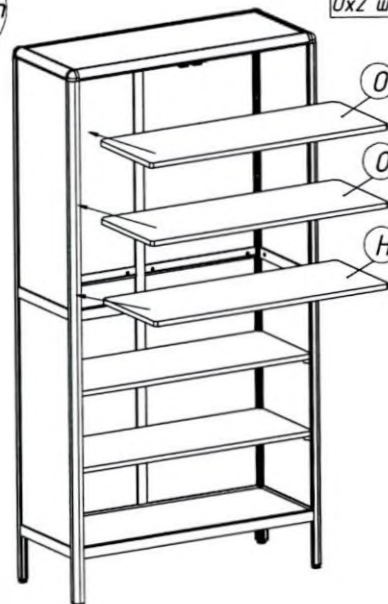


При необходимости положение полок (H) можно менять путём смещения (регулировкой) полкодержателей [6] по вертикали

Шкаф медицинский лабораторный (мод.4)

Произведите установку ответной планки магнита и ручки на двери

13 этап


Дверь правая нижняя

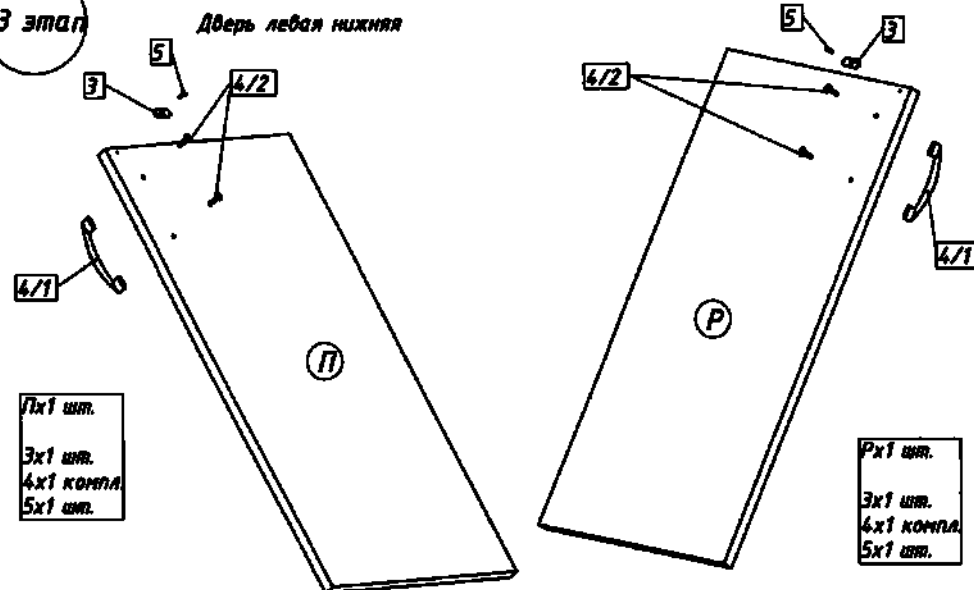

Дверь правая верхняя

Наклейте самоклеящийся логотип компании 11

Дверь левая верхняя

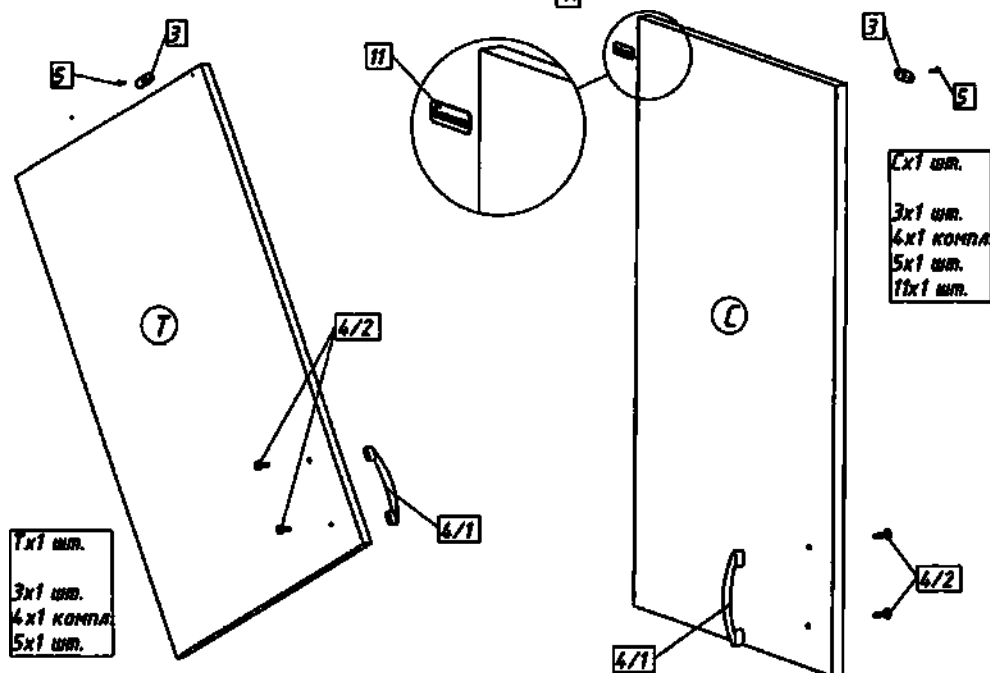

ВНИМАНИЕ!


Во избежание повреждения дверей шкафа их установку рекомендуется выполнять сборщикам в количестве 2-х человек. Также перед их установкой необходимо проверить:

- винты замков установленных прогонов надежно затянуты, и шкаф не имеет диагональных перекосов;
- наличие в каждой петле 2 пластиковых колпачков на затяжных винтах.

Если хотя бы одно из условий не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНА!


14 этап

Схема установки дверей из ЛДСП

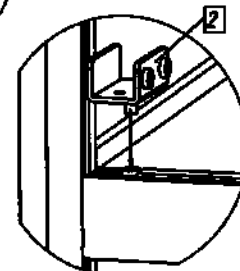


Установите нижние петли 2

Схема установки двери в петле

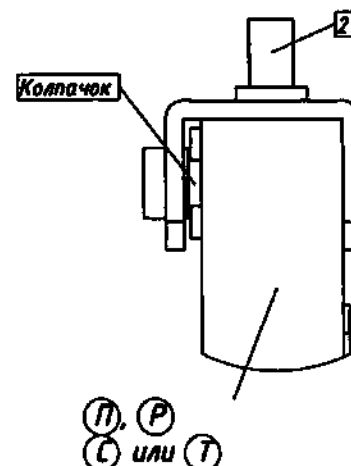

Установите верхние петли 2 и придерживая их от выпадения, вставьте между петель двери без перекосов.



1x1 шт.
Рх1 шт.
Сх1 шт.
Тх1 шт.
2x4 компл

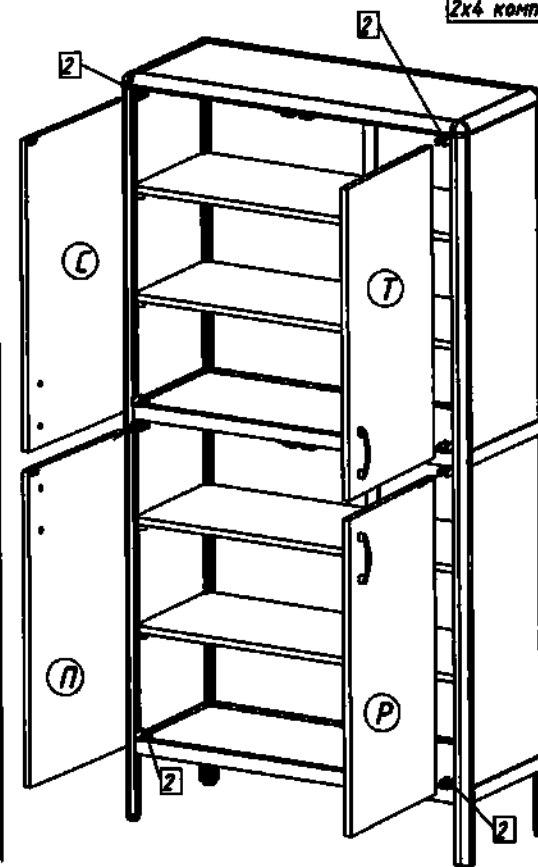

Внимание: Установку дверей производить только в вертикальном положении шкафа. После установки дверей необходимо затянуть все фиксирующие винты петель 2 до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов. Это может привести к порче двери.

15 этап

Схема регулировки магнитов на среднем проходе и крышке

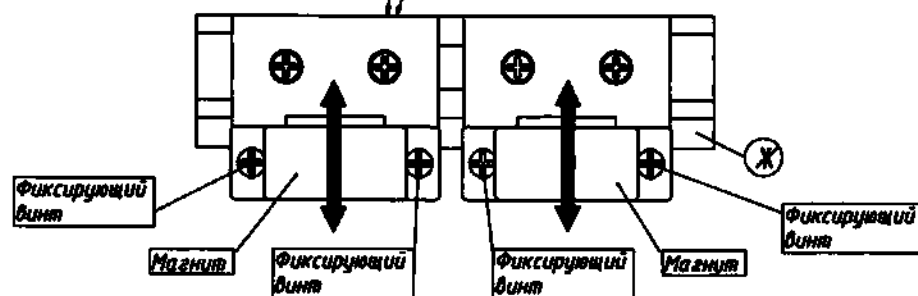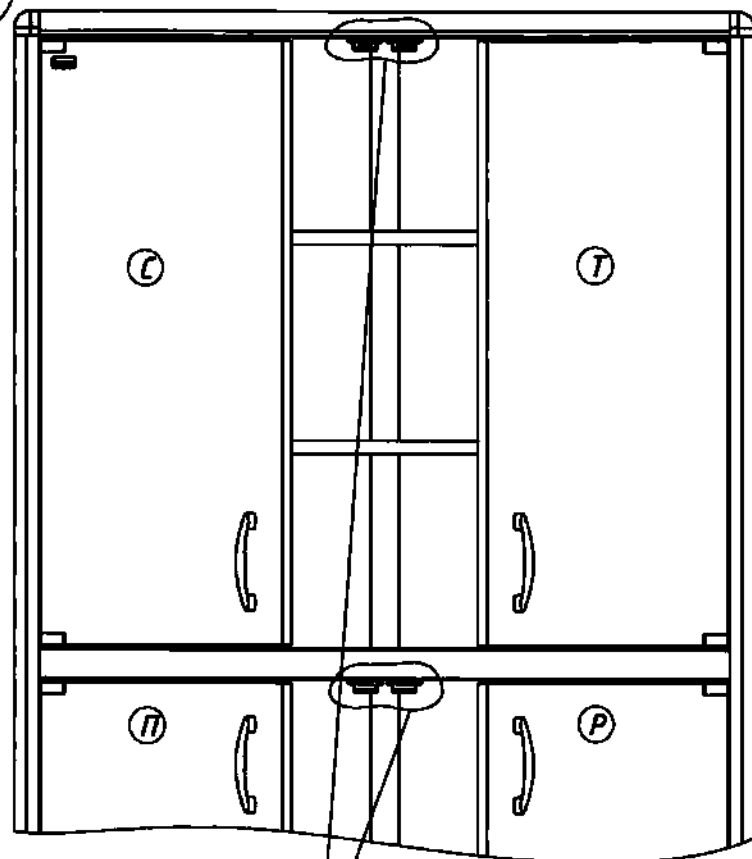

Открыв двери из ЛДСП, при необходимости ослабьте фиксирующие винты и соедините в требуемое положение магниты. После завершения регулировки затяните на магнитах фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки фиксирующих винтов на каждом из магнитов. Это может привести к порче его корпуса.

Двери в закрытом положении



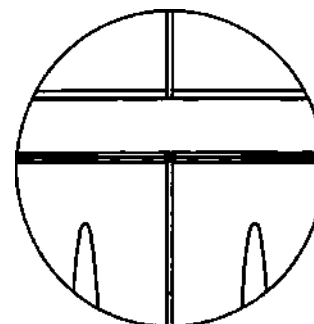


Схема фиксации дверей магнитом

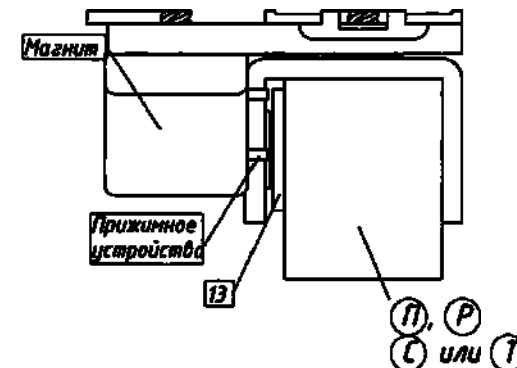


Собранное изделие

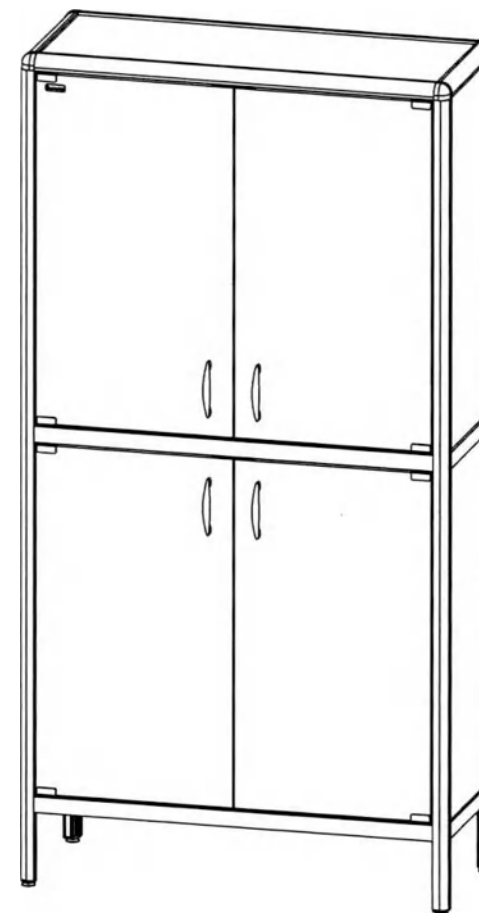

Инструкция по сборке изделия
Шкафы медицинские по ГИКС.942810.107 ТУ

Шкаф медицинский лабораторный (мод.5) в вариантах поставки 1, 2

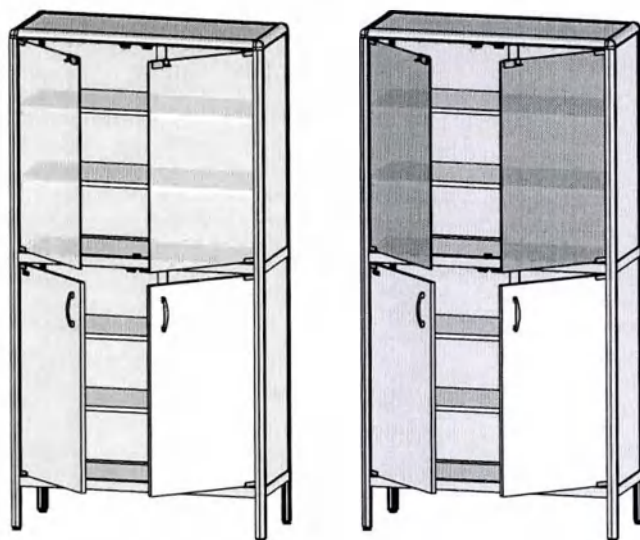

Условные обозначения:

1. А-Ф : детали

2. 1 - 17 : крепёж и фурнитура ☐ Код товара

3. 1 - 18 : этапы сборки

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Крышка	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Стенка задняя	3
Д	Стенка задняя	1
Е	Прогон стенки задней	1
Ж	Прогон средний передний	1
З	Прогон нижний передний	1
И	Заглушка декоративная крышки боковая	2
К	Заглушка декоративная прогона среднего	2
Л	Заглушка под ограничитель	1
М	Заглушка декоративная прогона нижнего	1
Н	Прогон задний	2
О	Прогон задний нижний	1
П	Стеклянная дверца	2
Р	Дверь левая нижняя	1
С	Дверь правая нижняя	1
Т	Дно/полка средняя	2
У	Полка	2
Ф	Полка верхняя	2

Крепёж и фурнитура


Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	4	Опора	
2	2	Накладка для магнитной защёлки	
3	1	Ограничитель стеклянных дверей	
4	2 комплекта	Петля для стеклянных дверей	
5	2	Ручка стеклянных дверей	
6	16	Полкодержатель	
7	1	Заглушка декоративная	
8	4	Площадка магнита	
9	8	Саморез 3x16	
10	4	Защёлка магнитная	
11	10	Саморез 3x12	
12	2 комплекта	Ручка мебельная	
13	2	Ответная планка магнита	
14	2 комплекта	Петля для дверей из ЛДСП	
15	1	Логотип компании	
16	1	Ключ шестигранник малый	
17	1	Ключ шестигранник большой	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

Схема сборки изделия


6 этап

Произведите установку стенок боковых

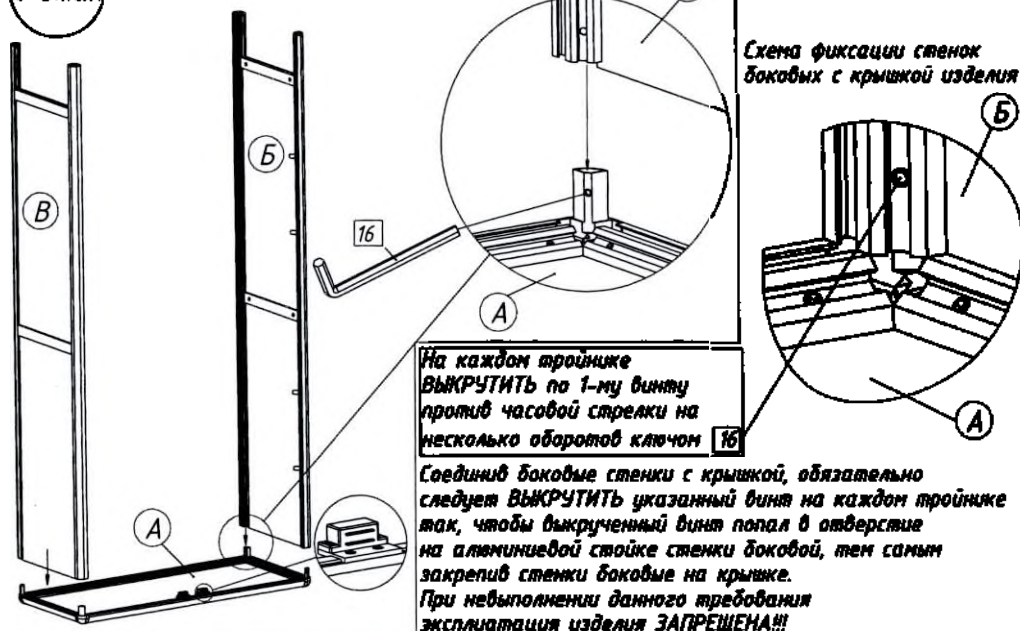


Произведите установку стенок и прозоров задних

7 этап

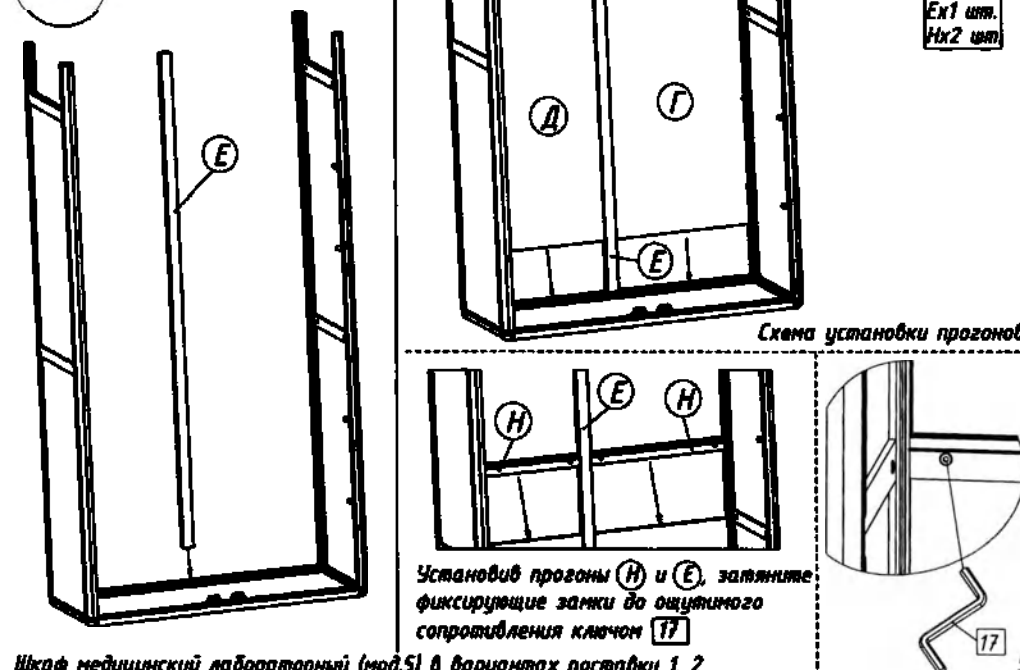

Произведите установку прозоров передних и заднего нижнего

8 этап

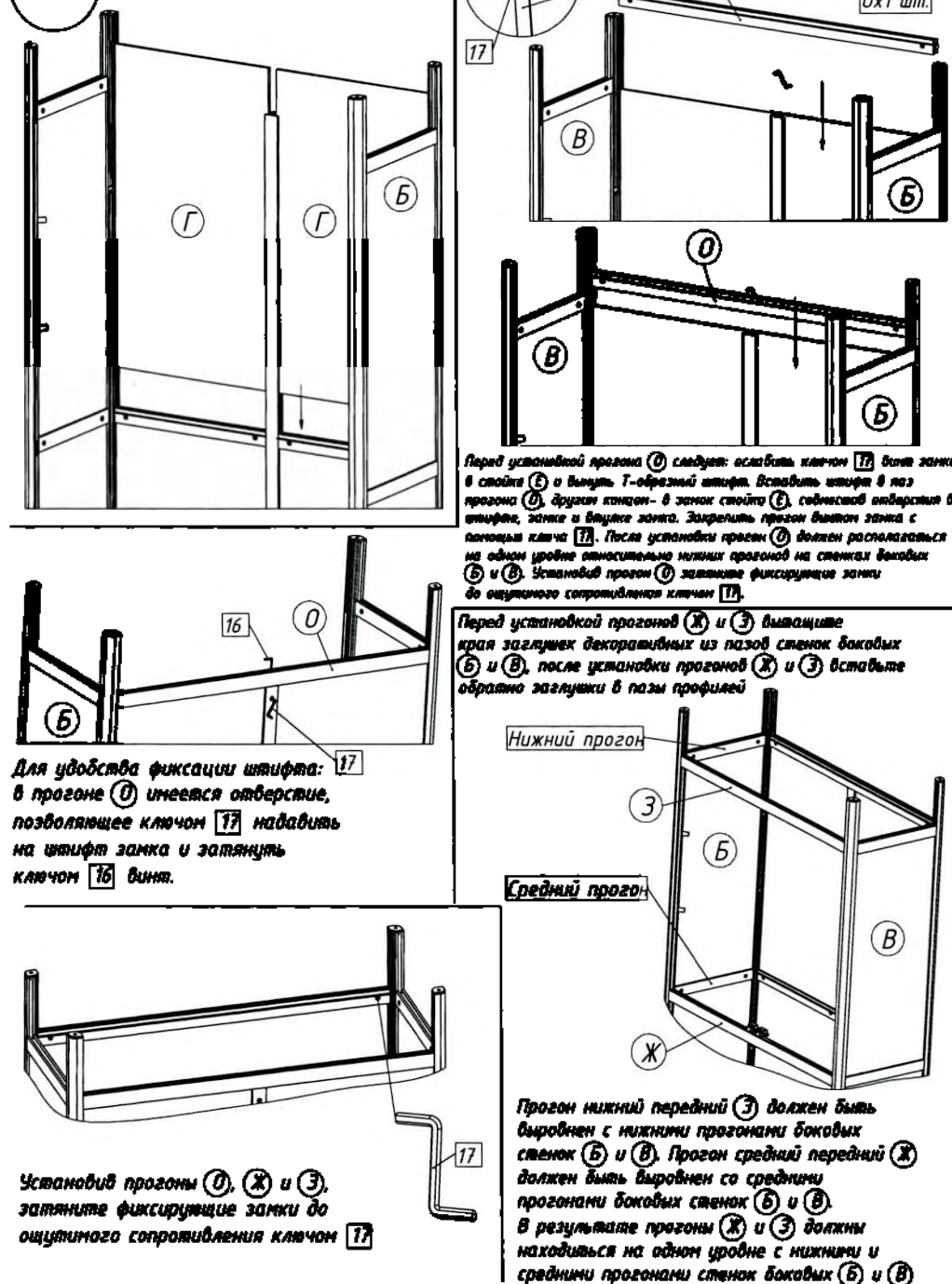


ОМ 29.744.01

Произведите установку опор путём вкручивания их по часовой стрелке, а так же установите заглушки

9 этап

1x4 шт.


Опоры 1 следует закручивать рожковым ключом 10 по часовой стрелке либо плоскогубцами. **ВНИМАНИЕ:** Рожковый ключ 10, плоскогубцы не входят в комплект поставки изделия

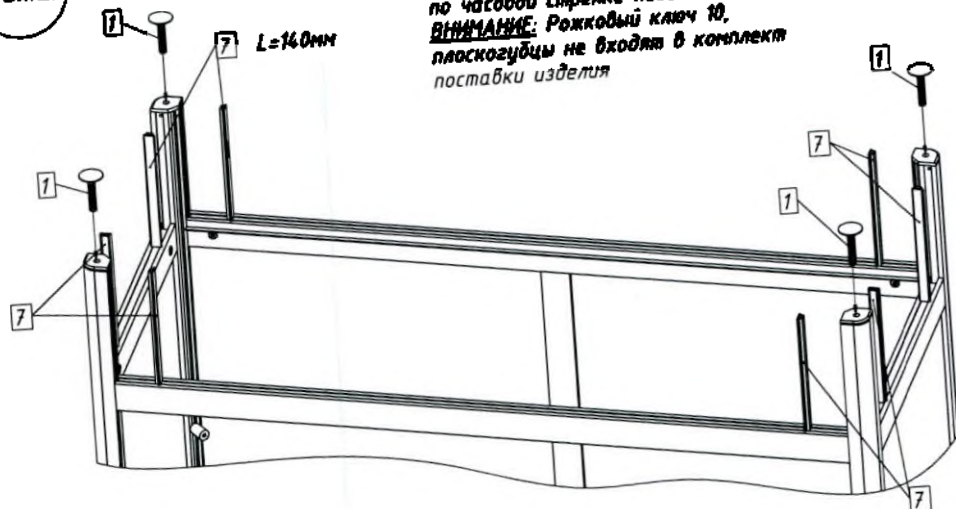

После установки опор и заглушек переверните изделие и поставьте его на опоры

Собранный каркас шкафа

10 этап

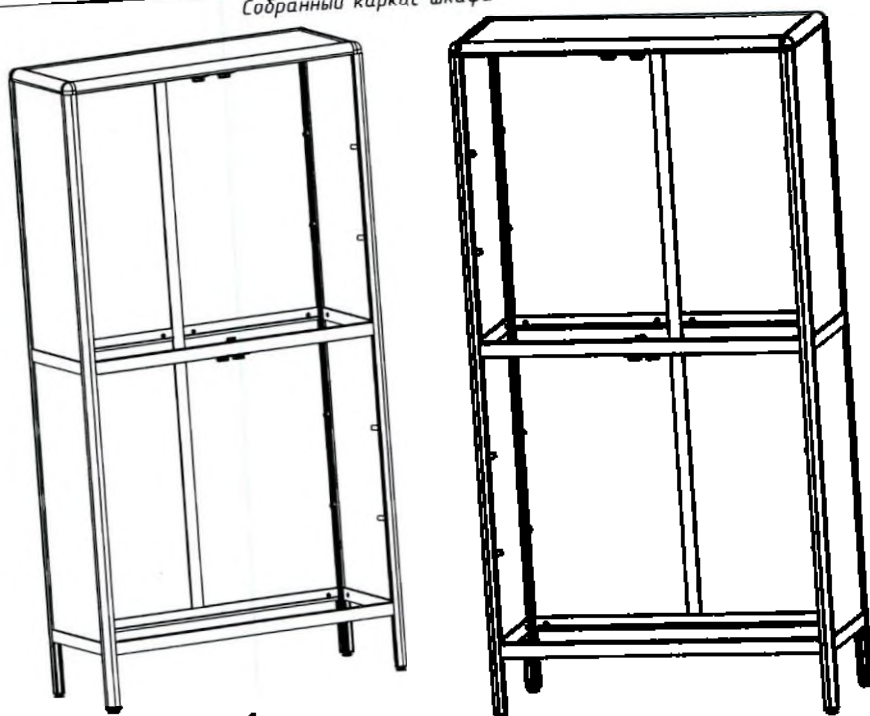



Указаны виды с разных ракурсов

Шкаф медицинский лабораторный (мод.5) в вариантах поставки 1, 2

ОМ 29.744.01 Произведите установку полок в нижнее отделение шкафа

11 этап

1x1 шт.
5x2 шт.

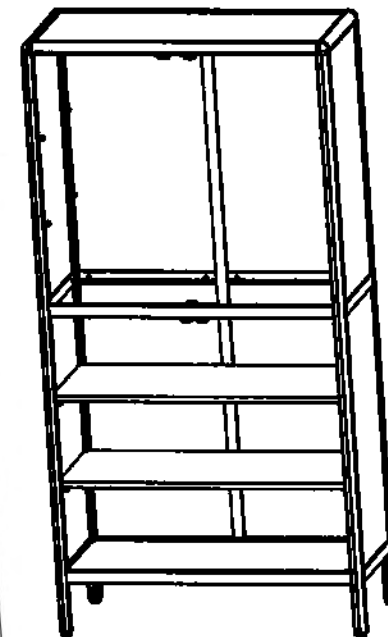
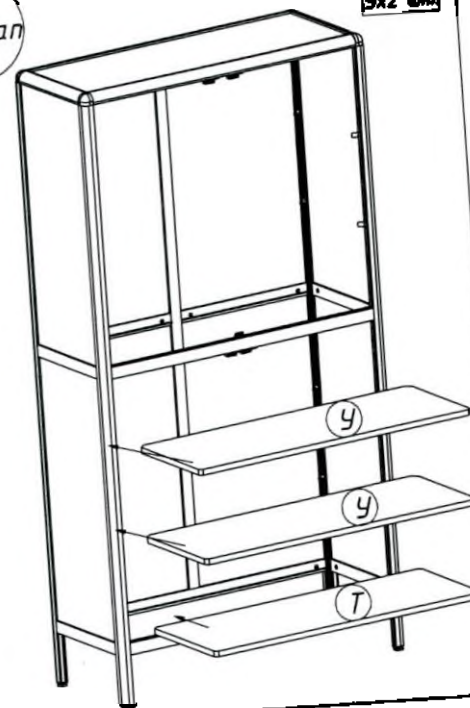


При необходимости положение полок 9 можно менять путём смещения (регулировкой) полкодержателей 6 по вертикали

Произведите установку полок в верхнее отделение шкафа

12 этап

1x1 шт.
Фх2 шт.

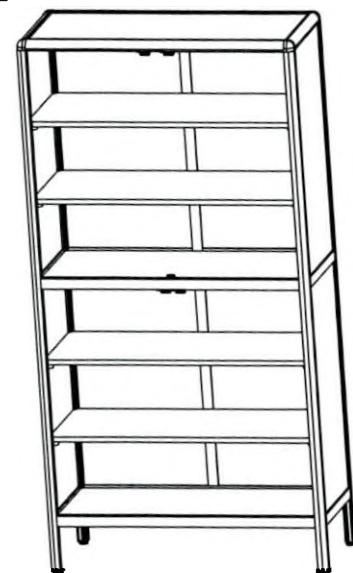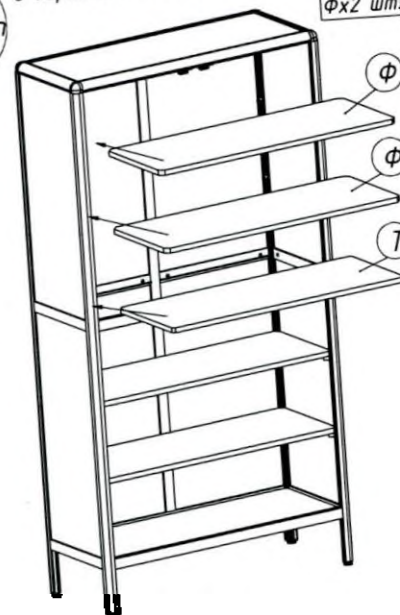

При необходимости положение полок 9 и Ф можно менять путём смещения (регулировкой) полкодержателей 6 по вертикали


Шкаф медицинский лабораторный (мод.5) в вариантах поставки 1, 2

Произведите установку ответной планки магнита и ручки на нижние двери

13 этап

Дверь правая

Рх1 шт.
Сх1 шт.
11х2 шт.
12х2 компл.
13х2 шт.
15х1 шт.

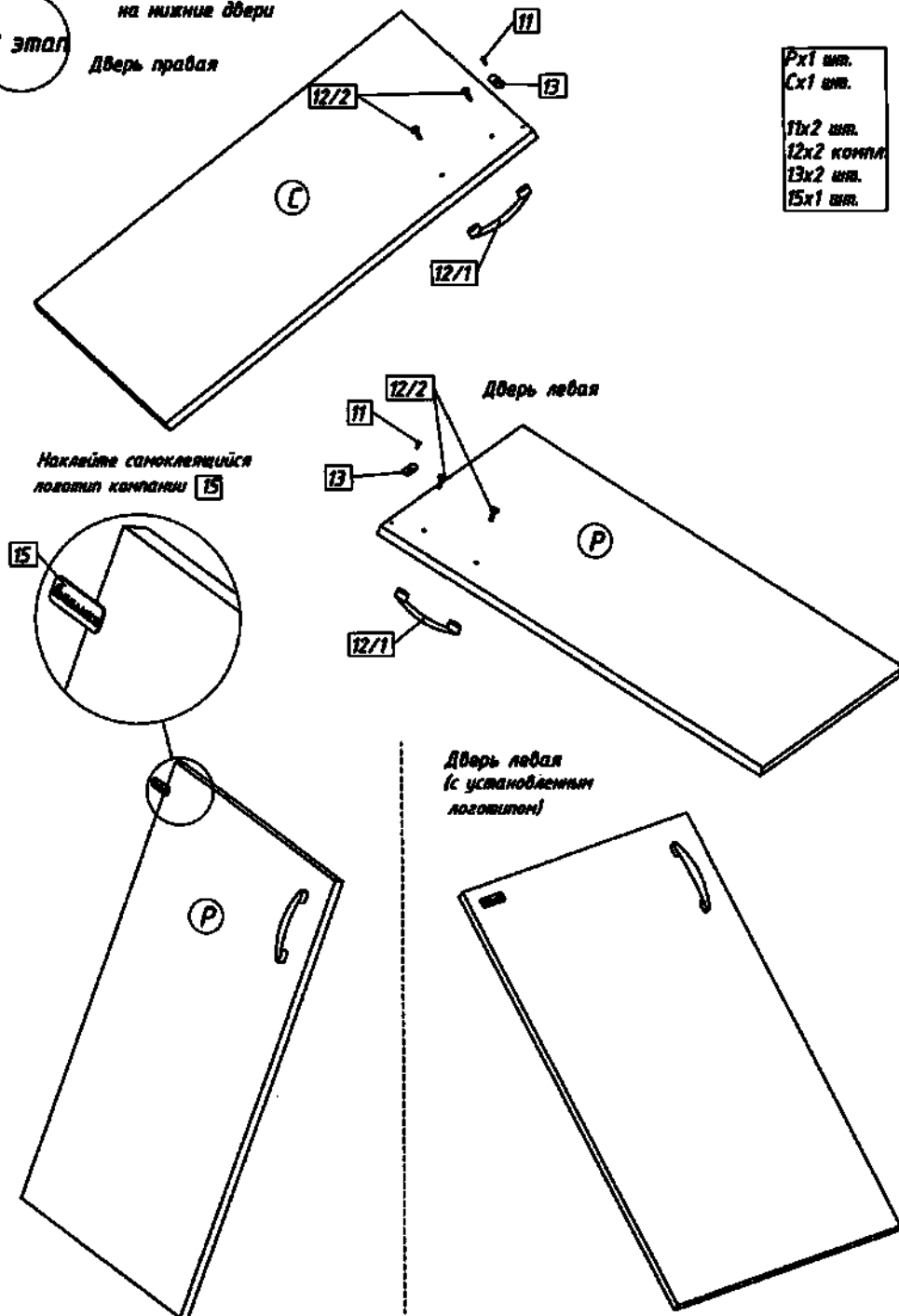**ВНИМАНИЕ!**


Во избежание повреждения дверей шкафа их установку рекомендуется выполнять сборщикам в количестве 2-х человек. Также перед их установкой необходимо проверить:

- винты замков установленных прогонов надежно затянуты, и шкаф не имеет диагональных перекосов;
- наличие в каждой петле 14 пластиковых колпачков на затяжных винтах.

Если хотя бы одно из условий не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия **ЗАПРЕЩЕНА!**

Схема установки дверей из ЛДСП (нижних)


14 этап

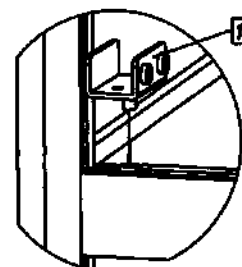

Установив верхние петли 14 и придерживая их от выпадения, вставьте между петель двери без перекосов.



Рх1 шт.
Сх1 шт.
14х2 компл.

Установите нижние петли 14

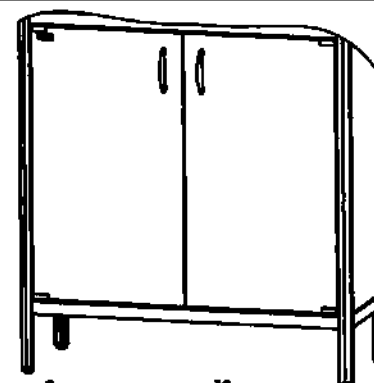

Установленные нижние двери


Схема установки двери в петлю

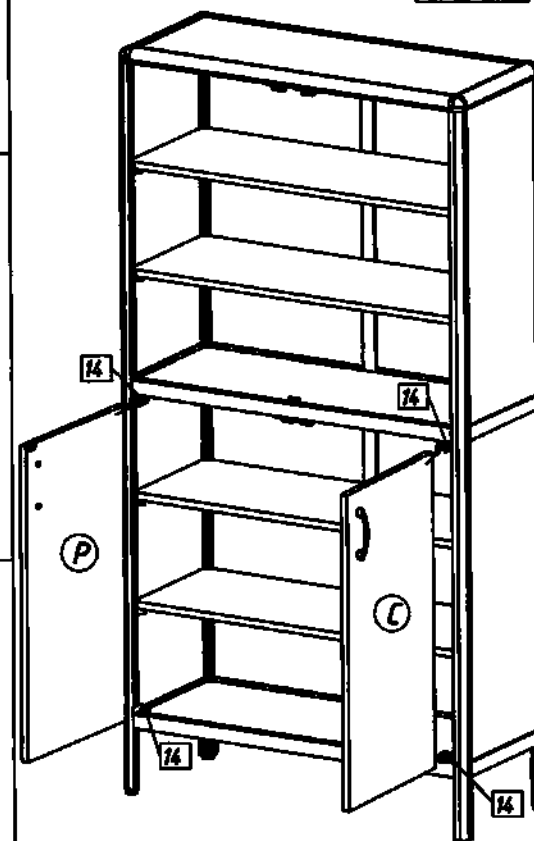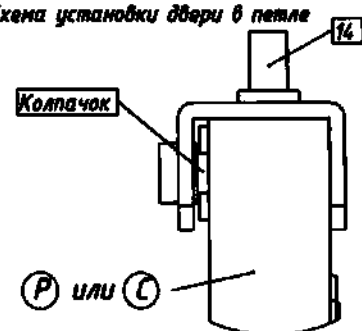

Внимание: Установку дверей производить только в вертикальном положении шкафа. После установки дверей (П) и (Л) необходимо затянуть все фиксирующие винты петель 14 до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов. Это может привести к порче двери.

Шкаф медицинский лабораторный (мод.5) в вариантах поставки 1, 2

15 этап

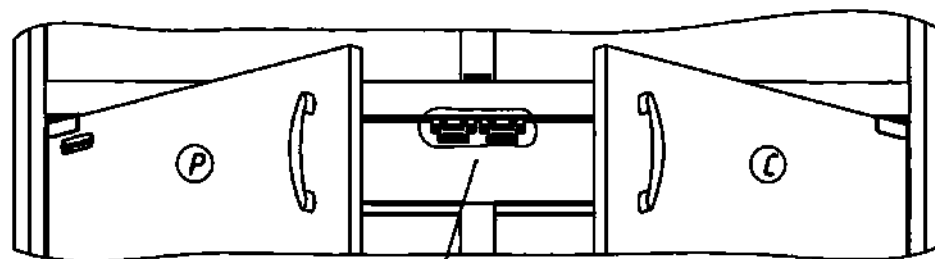

Открыв двери из ЛДСП **Р** и **С**, при необходимости ослабьте фиксирующие винты и сдвиньте в требуемое положение оба магнита. После завершения регулировки затяните на магнитах фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки фиксирующих винтов на каждом из магнитов. Это может привести к порче его корпуса.

Двери в закрытом положении

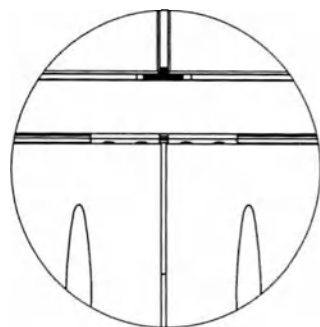
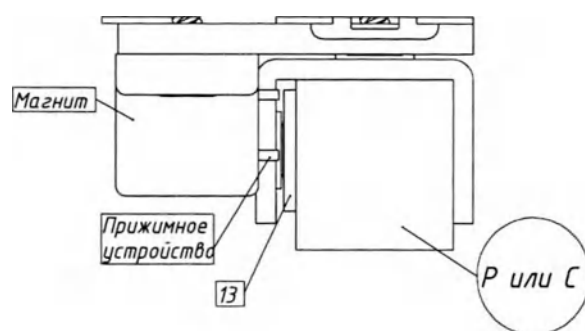


Схема фиксации нижних дверей магнитом

**ВНИМАНИЕ!**


Во избежание повреждения стеклянных дверок шкафа их установку рекомендуется выполнять сборщикам в количестве 2-х человек. Также перед их установкой необходимо проверить:

- винты замков установленных прогонов надежно затянуты, и шкаф не имеет диагональных перекосов;
- наличие в каждой петле **4** пластиковых прокладок и колпачков на затяжных винтах.


Если хотя бы одно из условий не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия **ЗАПРЕЩЕНА!**

Схема установки стеклянных дверок верхних

16 этап

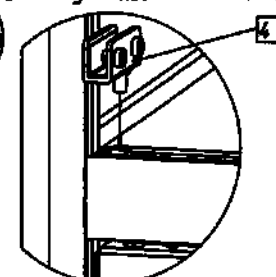


Установите верхние петли **4** и придерживая их от выпадения, вставьте между петель стеклянные двери без перекосов.

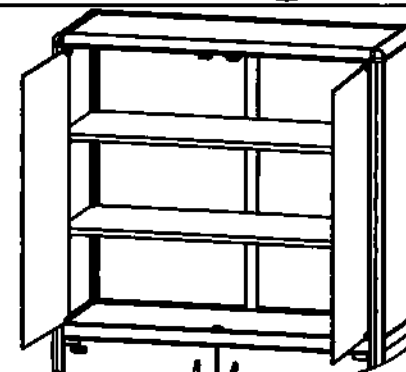Установите нижние петли **4**

Установленные верхние стеклянные дверцы

Схема установки стеклянной дверцы в петле

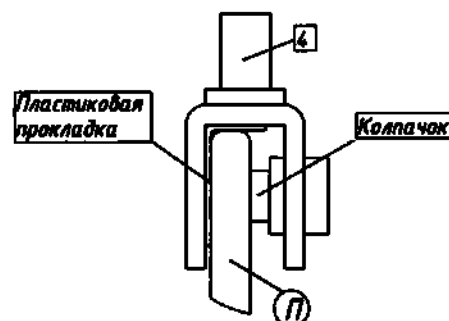

Внимание: Установку стеклянных дверок производить только в вертикальном положении шкафа. После установки стеклянных дверок **П** необходимо затянуть все фиксирующие винты петель **4** до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов. Это может привести к порче стеклянной дверцы.

17 этап

Схема затяжки винтов на ручке 5 стеклянной двери левой



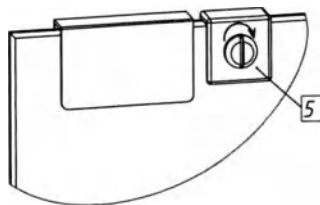


Схема затяжки винтов на ручке 5 стеклянной двери правой

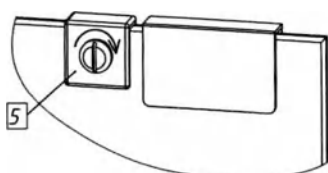


Стеклянные двери в закрытом положении

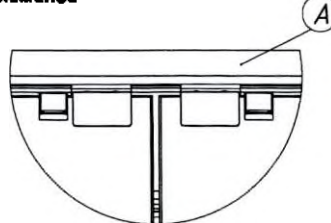



Установив на стеклянные двери накладки для магнитной защёлки 2 и ручки 5, отрегулируйте их положение таким образом, чтобы при закрытых стеклянных дверях 11 накладки для магнитной защёлки 2 всей поверхностью соприкасались с магнитами, а ручки 5 не препятствовали свободному закрыванию/открыванию стеклянных дверей 11. Затяните на ручках фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов на ручках. Это может привести к порче стеклянной двери. При необходимости возможна регулировка магнитов, см. Этап 18

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения стеклянной двери при установке накладок 2 и ручки 5 необходимо убедиться в наличии колпачков на затяжных винтах ручки 5, а также установленной защитной прокладке в металлической накладке 2. Если защитные элементы отсутствуют, установка данных деталей на изделие **ЗАПРЕЩЕНА!**

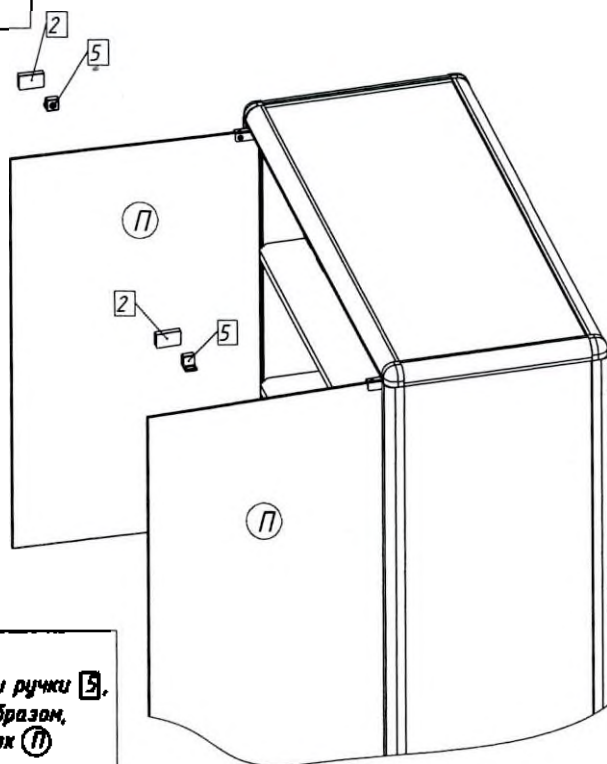2x2 шт
5x2 шт

18 этап

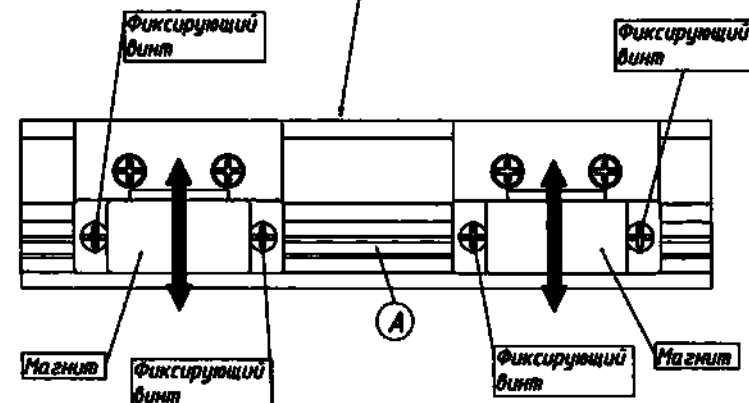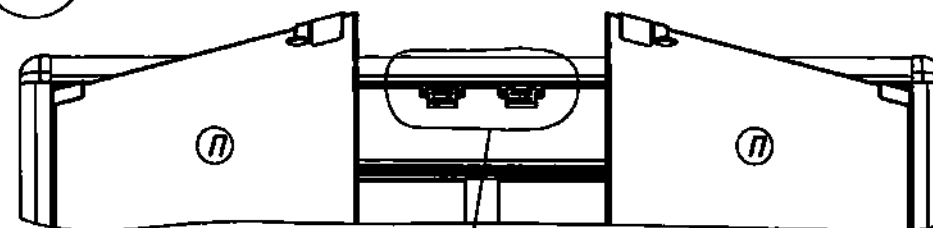

Открыв стеклянные двери 11, при необходимости ослабьте фиксирующие винты и сдвиньте в требуемое положение оба магнита. Завершив регулировку, затяните на магнитах фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки фиксирующих винтов на каждом из магнитов. Это может привести к порче его корпуса.

Стеклянные двери в закрытом положении



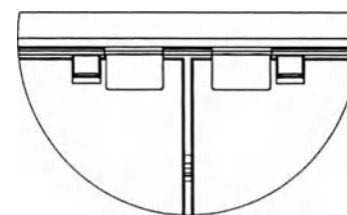


Схема фиксации стеклянных дверей магнитом

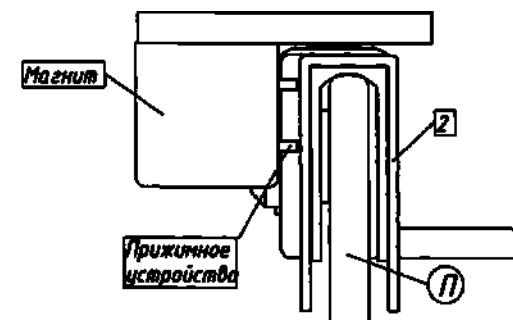

Инструкция по сборке изделия
Шкафы медицинские по ГИКС.942810.107 ТУ

Шкаф медицинский лабораторный (мод.6) в вариантах поставки 1, 2

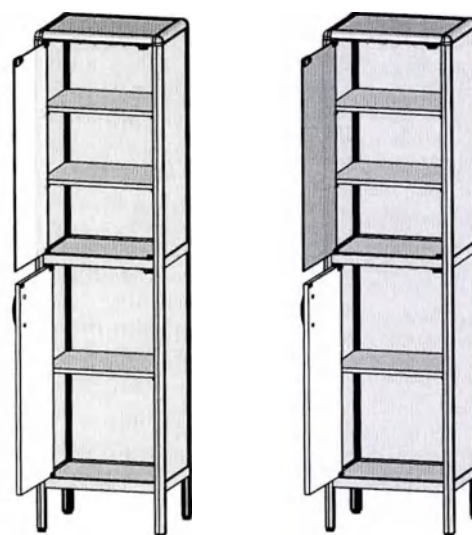

Условные обозначения:

1. А-Т : детали

2. 1 - 17 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 18 : этапы сборки

□ Код товара

□ Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Крышка	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Стенка задняя верхняя	1
Д	Прогон задний	2
Е	Стенка задняя нижняя	1
Ж	Прогон средний передний	1
З	Прогон нижний передний	1
И	Заглушка прогона	1
К	Заглушка правая крышки	1
Л	Заглушка левая крышки	1
М	Заглушка под ограничитель	1
Н	Стеклопанель	1
О	Дверь левая нижняя	1
П	Дно/полка средняя	2
Р	Полка	1
С	Полка верхняя	2
Т	Заглушка нижняя	1

Крепёж и фурнитура


Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	4	Опора	
2	1	Накладка для магнитной защёлки	
3	1 комплект	Петля для двери ЛДСП	
4	1 комплект	Петля для стеклянной двери	
5	1	Ручка стеклянной двери	
6	12	Полкодержатель	
7	1	Заглушка декоративная	
8	2	Площадка магнитная	
9	4	Саморез 3x16	
10	2	Защёлка магнитная	
11	5	Саморез 3x12	
12	1	Ограничитель стеклянных дверей	
13	1 комплект	Ручка небельная	
14	1	Ответная планка магнитная	
15	1	Поворотник комплектный	
16	1	Ключ шестигранный малый	
17	1	Ключ шестигранный большой	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

ОМ 29.747.01 Произведите сборку крышки Рекомендации для сборки: разложите на твердой


поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборку деталей и изделия!

1 этап

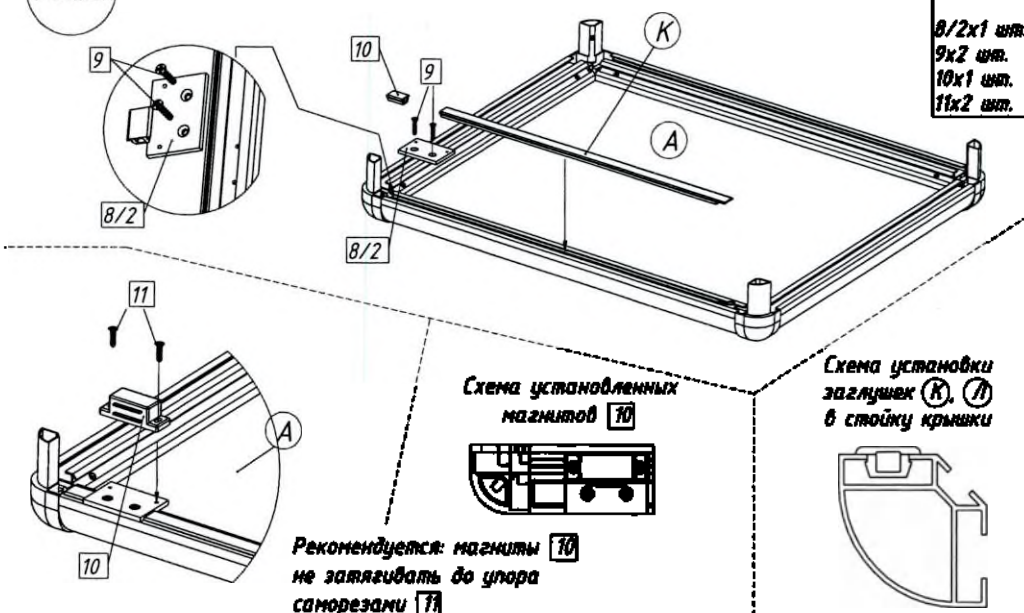


2 этап

Произведите сборку прогона среднего переднего

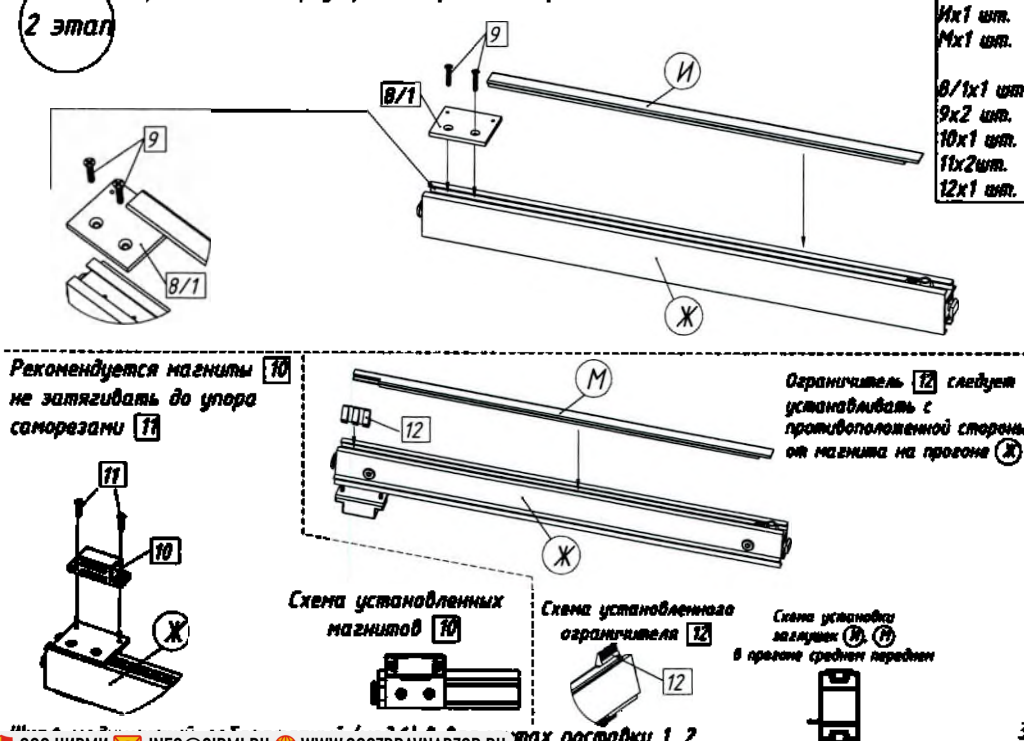


ОМ 29.747.01 Произведите сборку прогона нижнего переднего

3 этап

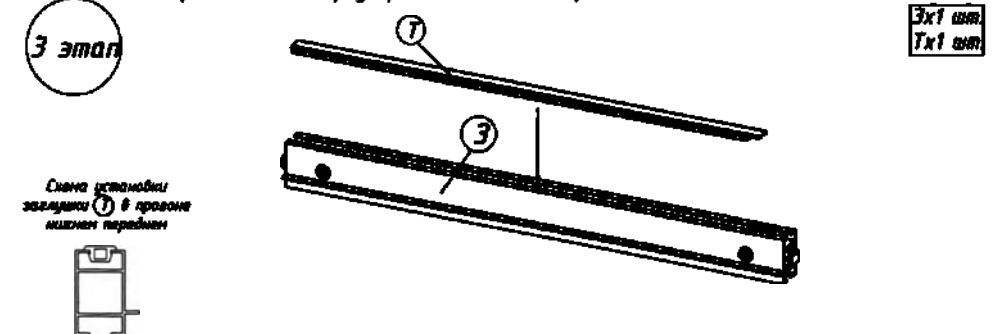

Произведите сборку стенки левой

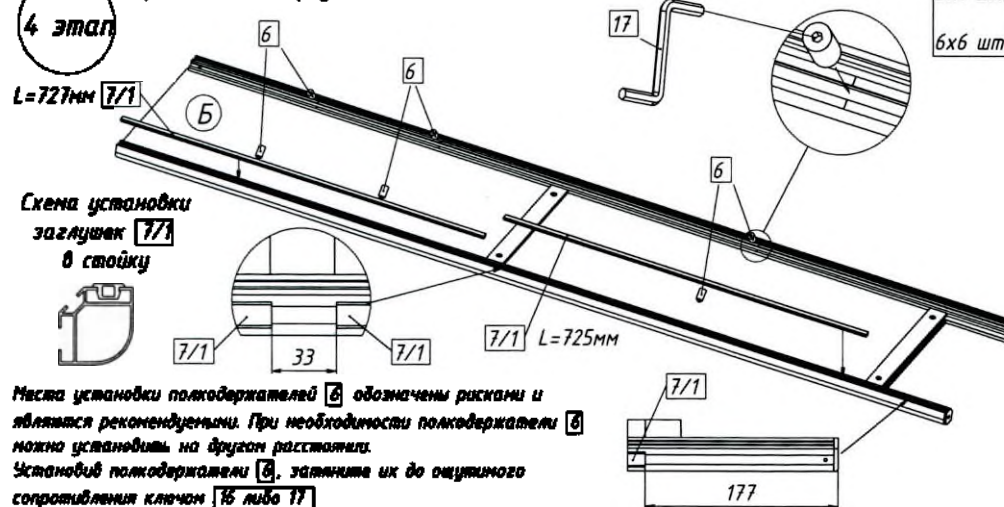

Произведите сборку стенки правой

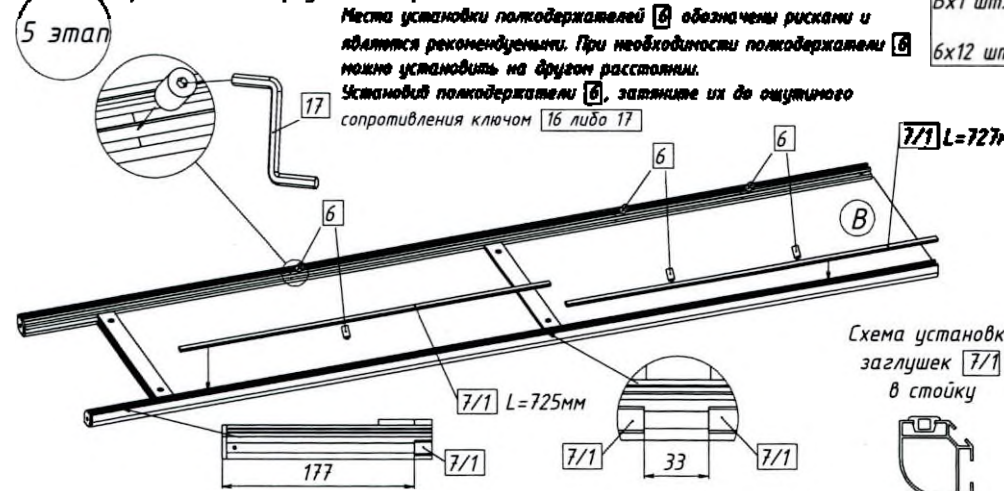


Схема сборки изделия

6 этап

Произведите установку стенок боковых


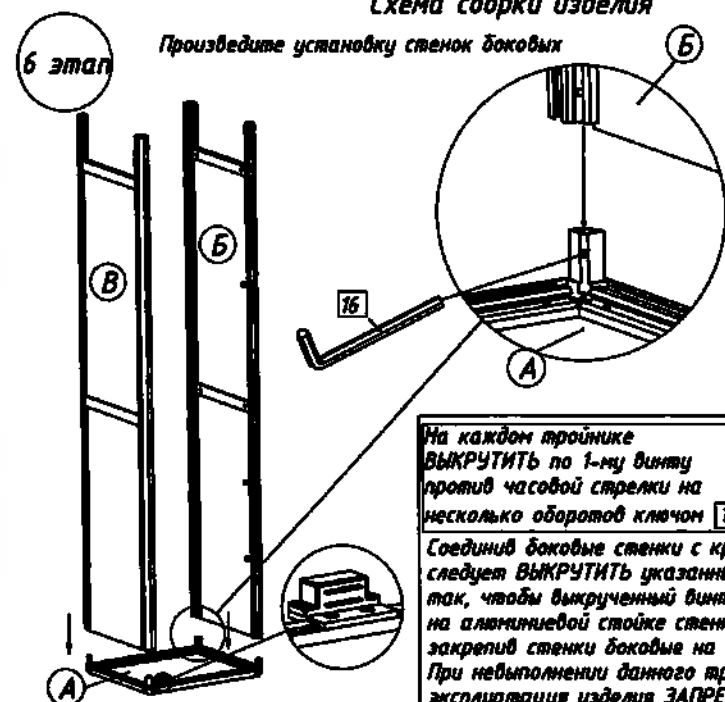


Схема фиксации стенок боковых с крышкой изделия

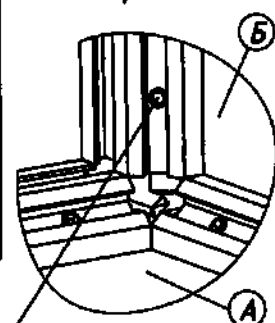

На каждом тройнике **ВЫКРУТИТЬ** по 1-му винту против часовой стрелки на несколько оборотов ключом 16

Соединив боковые стенки с крышкой, обязательно следует **ВЫКРУТИТЬ** указанный винт на каждом тройнике так, чтобы выкрученный винт попал в отверстие на алюминиевой стойке стенки боковой, тем самым закрепив стенки боковые на крышке.



При невыполнении данного требования эксплуатация изделия **ЗАПРЕЩЕНА!!!**

Ах1 шт.
Бх1 шт.
Вх1 шт.

7 этап

Произведите установку стенок и прогонов задних

Схема установки прогонов

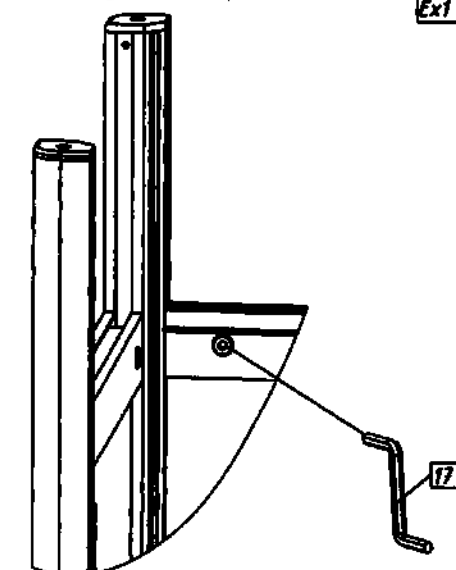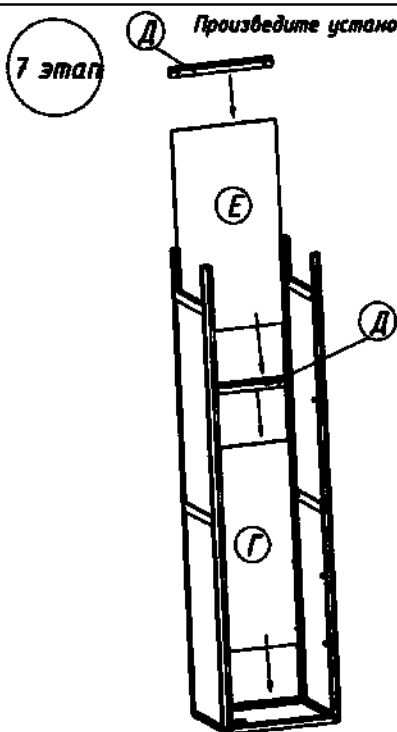


Установив прогоны (Д), затяните фиксирующие замки до ощутимого сопротивления ключом 17

Гх1 шт.
Дх2 шт.
Ех1 шт.

8 этап


Произведите установку прогонов передних

Перед установкой прогонов (Ж) и (З) вытащите края заглушек декоративных из пазов стенок боковых (Б) и (В). После установки прогонов (Ж) и (З) вставьте заглушки обратно в пазы профилей

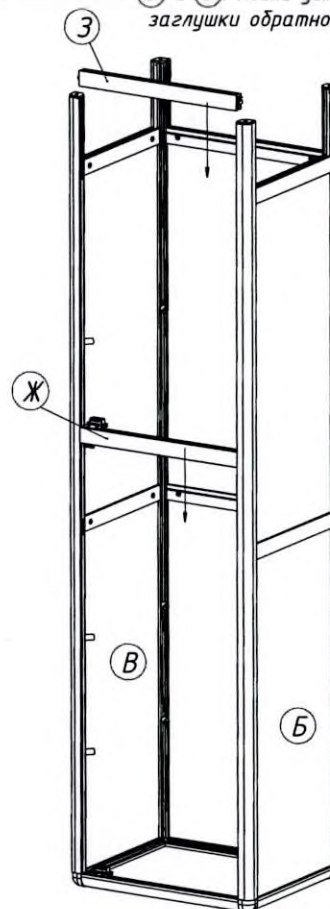

Нижний прогон

Средний прогон

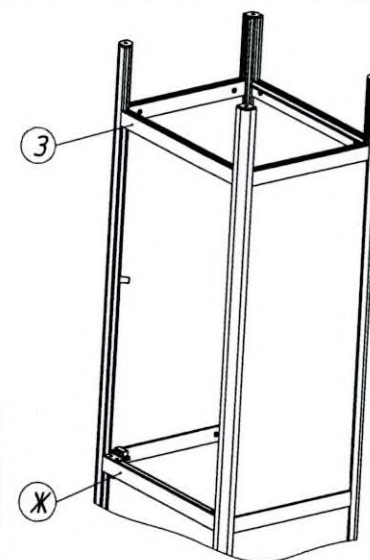

Установив прогоны (Ж) и (З), затяните фиксирующие замки до ощутимого сопротивления ключом 17


Прогон нижний передний (З) должен быть выровнен с нижними прогонами боковых стенок (Б) и (В). Прогон средний передний (Ж) должен быть выровнен со средними прогонами боковых стенок (Б) и (В). В результате прогоны (Ж) и (З) должны находиться на одном уровне с нижними и средними прогонами стенок боковых (Б) и (В).

Жх1 шт.
Зх1 шт.

ОМ 29.747.01 Произведите установку опор путём вкручивания их по часовой стрелке, а так же установите заглушки

9 этап


Опоры 1 следует закручивать рожковым ключом 10 по часовой стрелке либо плоскогубцами. **ВНИМАНИЕ:** Рожковый ключ 10, плоскогубцы не входят в комплект поставки изделия

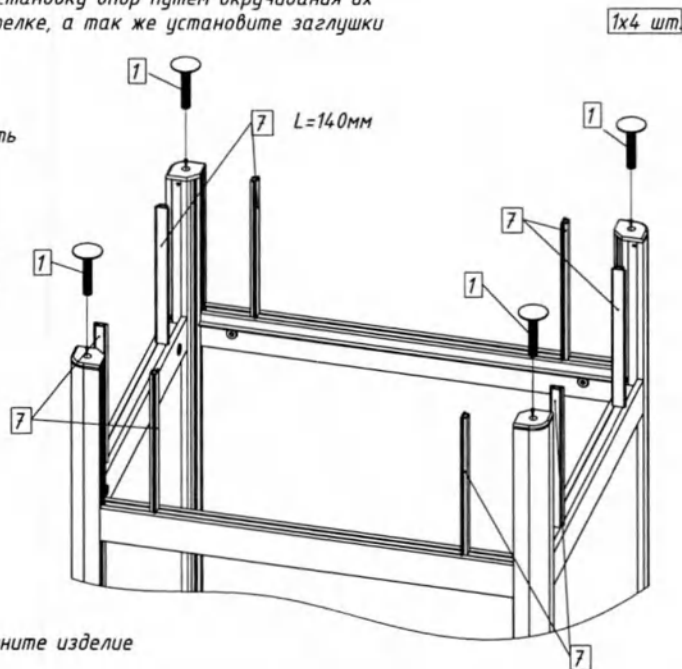

После установки опор переверните изделие и поставьте его на опоры

Собранный каркас шкафа


10 этап

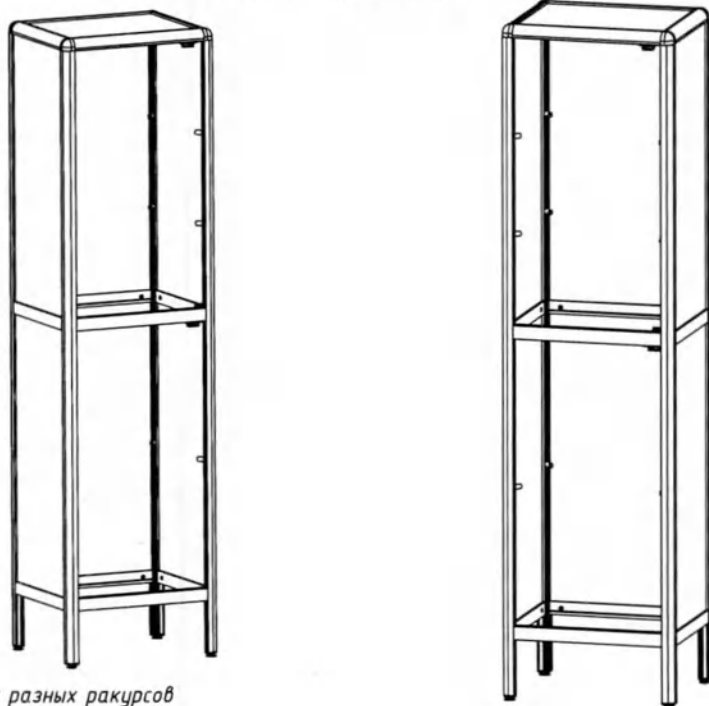

Указаны виды с разных ракурсов

ОМ 29.747.01 Произведите установку полок в нижнее отделение шкафа


11 этап

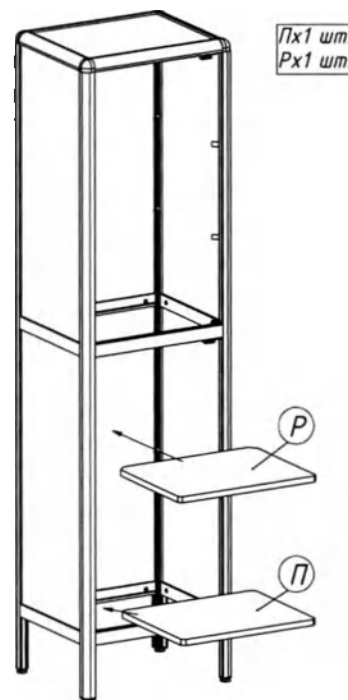

При необходимости положение полки (Р) можно менять путём смещения (регулировкой) полкодержателей 6 по вертикали

12 этап


Произведите установку полок в верхнее отделение шкафа

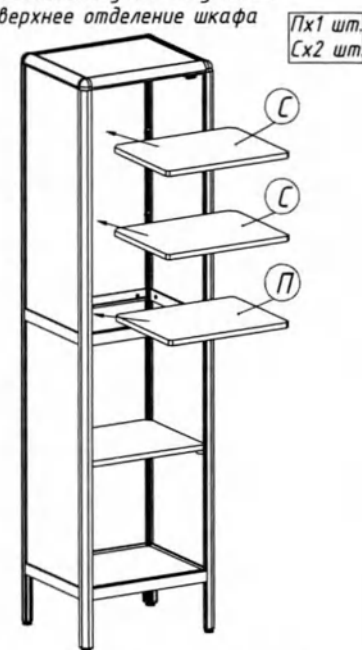



При необходимости положение полок (С) можно менять путём смещения (регулировкой) полкодержателей 6 по вертикали

Произведите установку ответной планки магнита и ручки на нижнюю дверь из ЛДСП


13 этап

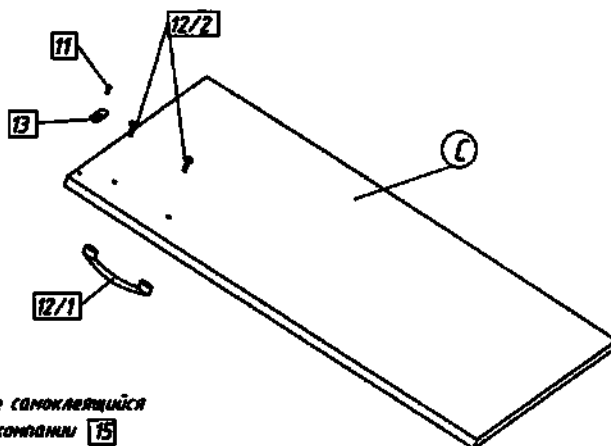

Наклейте самоклеящийся
логотип компании 15

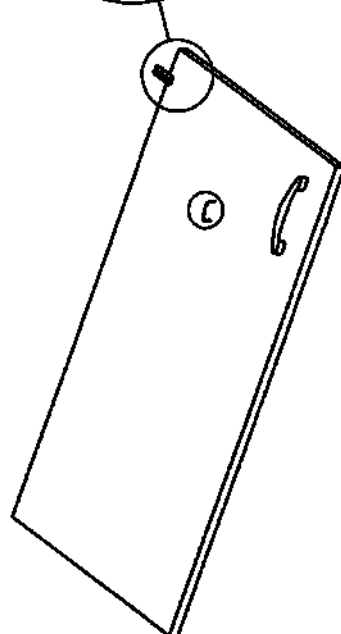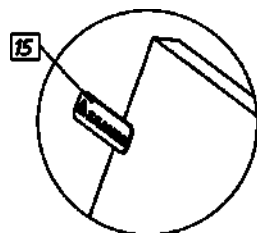

Дверь левая
(с установленным
логотипом)

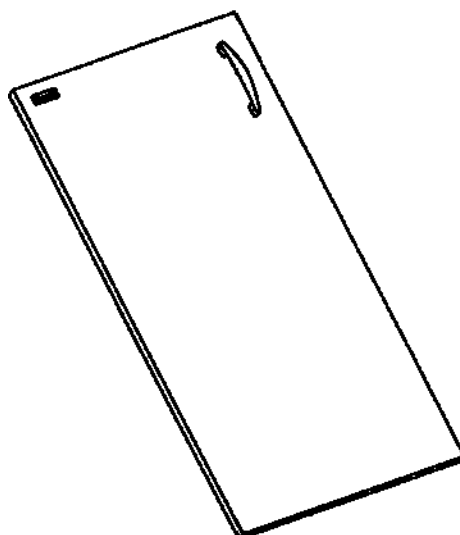

0x1 шт.

11x1 шт.

13x1 компл.

14x1 шт.

15x1 шт.

ВНИМАНИЕ!


Во избежание повреждения двери шкафа её установку рекомендуется выполнять сборщикам в количестве 2-х человек. Также перед её установкой необходимо проверить:

- винты замков установленных прогонов надежно затянуты, и шкаф не имеет диагональных перекосов;
- наличие в каждой петле 3 пластиковых колпачков на затяжных винтах.


Если хотя бы одно из условий не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНА!

Схема установки двери из ЛДСП (нижней)

14 этап

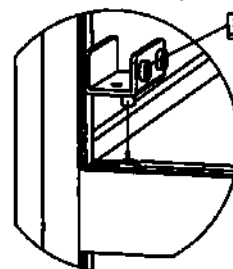


Установите нижнюю петлю 3

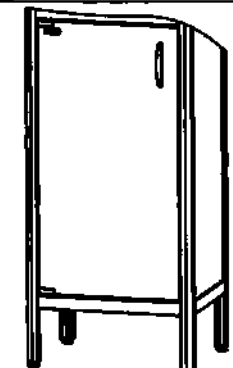

Установленная нижняя дверь


Схема установки дверцы в петлю

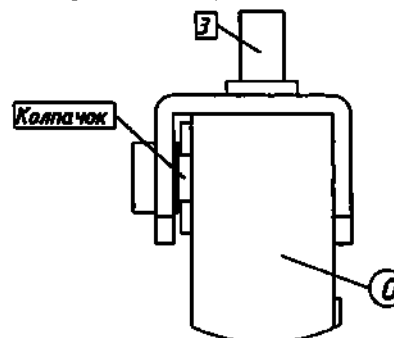

Установив верхнюю петлю 3 и, придерживая её от выпадения, вставьте между петель дверь без перекосов.

0x1 шт.



3x1 компл.

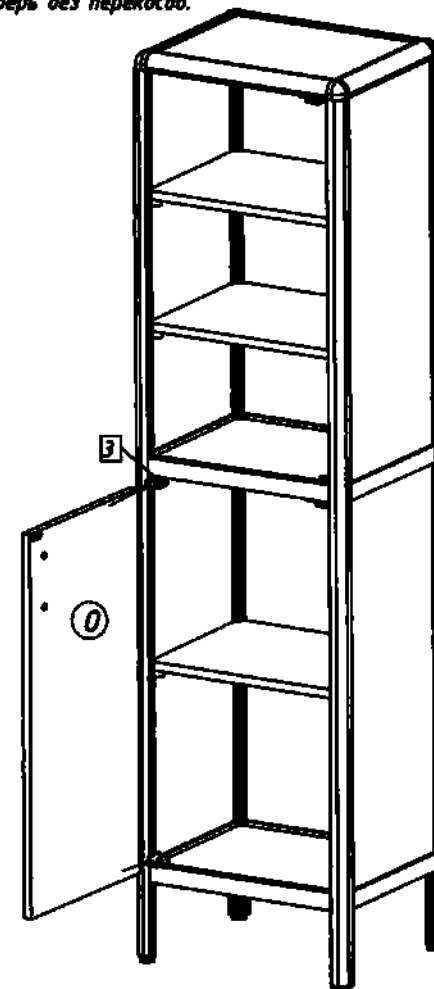

Внимание: Установку двери производить только в вертикальном положении шкафа. После установки двери 12/1 необходимо затянуть все фиксирующие винты петель 3 до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов. Это может привести к порче двери.

Шкаф медицинский лабораторный (мод.6) в вариантах поставки 1, 2

Схема регулировки магнита на среднем прогоне

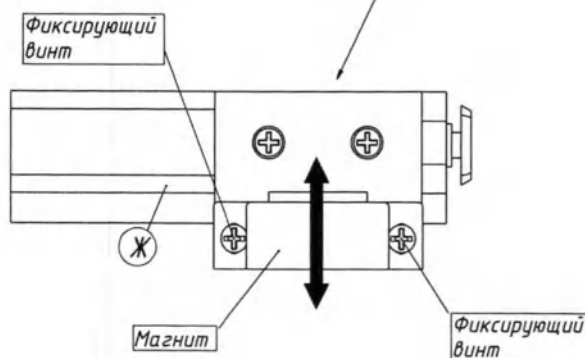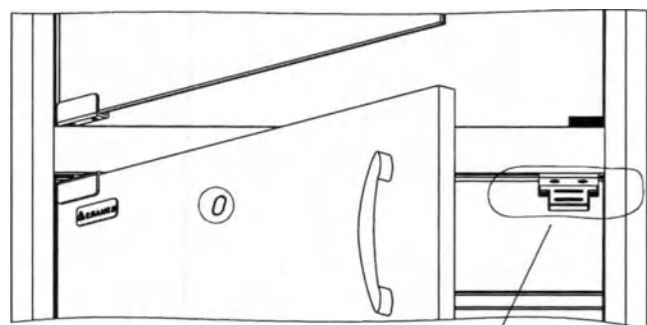

Открыв дверь (О), при необходимости ослабьте фиксирующие винты и сдвиньте в требуемое положение магнит. Завершив регулировку, затяните на магните фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки фиксирующих винтов на магните. Это может привести к порче его корпуса.

Дверь в закрытом положении


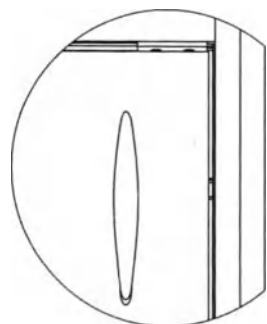


Схема фиксации двери магнитом

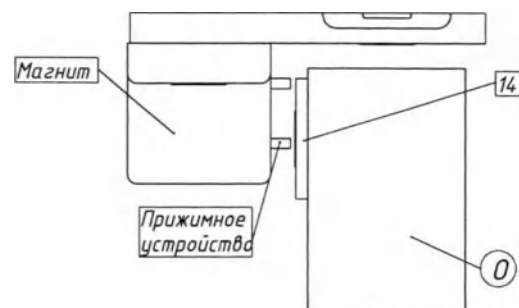

ВНИМАНИЕ!!!


Во избежание повреждения стеклянной дверки её установку рекомендуется выполнять сборщикам в количестве 2-х человек. Также перед установкой необходимо проверить:

- винты замков установленных прогонов надежно затянуты, и шкаф не имеет диагональных перекосов;

- наличие в каждой петле (4) пластиковых прокладок и колпачков на затяжных винтах.

Если хотя бы одно из условий не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНА!!!


Схема установки стеклянной дверки (верхней)

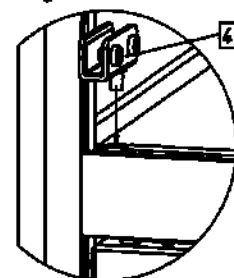

Установив верхнюю петлю (4) и придерживая её от выпадения, вставьте между петлей стеклянную дверь без перекосов.


Нх1 шт.
4х1 компл

Установите нижнюю петлю (4)

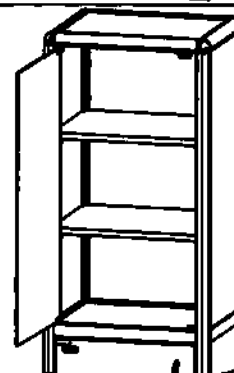


Установленная верхняя стеклянная дверца

Схема установки стеклянной дверцы в петлю

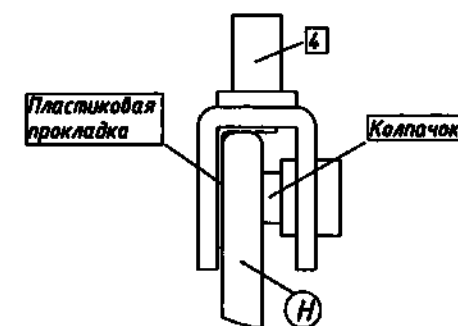


Внимание: Установку стеклянной дверки производить только в вертикальном положении шкафа. После установки стеклянной дверки (Н) необходимо затянуть все фиксирующие винты петель (4) до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов. Это может привести к порче стеклянной дверцы.

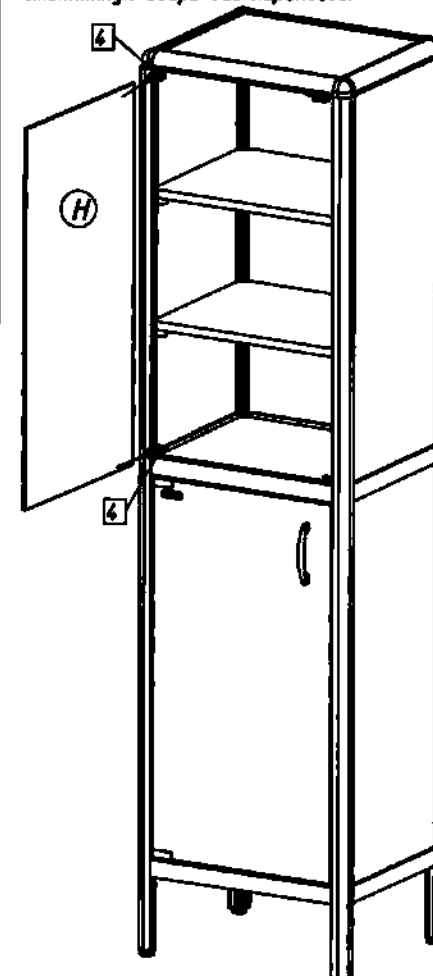


17 этап

Схема затяжки винтов на ручке 5 стеклянной двери

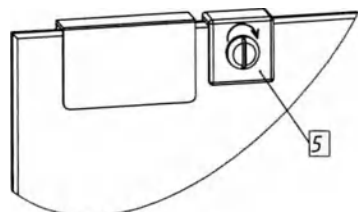



Стеклянная дверь в закрытом положении

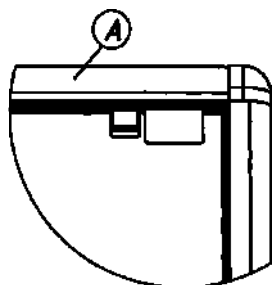

ВНИМАНИЕ!!!


Во избежание повреждения стеклянной двери при установке накладки 2 и ручки 5 необходимо убедиться в наличии колпачков на затяжном винте ручки 5, а также установленной защитной прокладке в металлической накладке 2. Если защитные элементы отсутствуют, установка данных деталей на изделие ЗАПРЕЩЕНА!!!

2x1 шт.
5x1 шт.

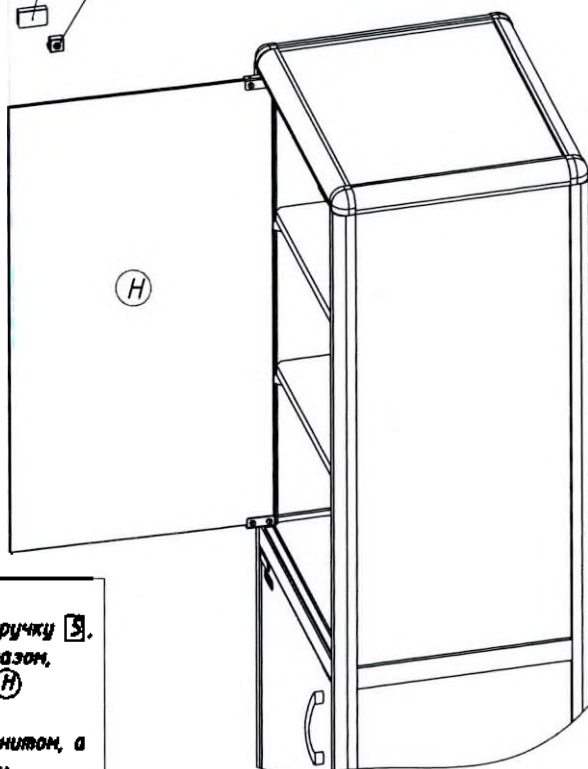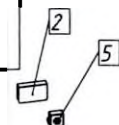


Установив на стеклянную дверь накладку для магнитной защёлки 2 и ручку 5, отрегулируйте их положение таким образом, чтобы при закрытой стеклянной двери (Н) накладка для магнитной защёлки 2 всей поверхностью соприкасалась с магнитом, а ручка 5 не препятствовала свободному закрыванию/открыванию стеклянной двери (Н). Затяните на ручке фиксирующий винт до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винта на ручке. Это может привести к порче стеклянной двери. При необходимости возможна регулировка магнита, см. Этап 18

18 этап

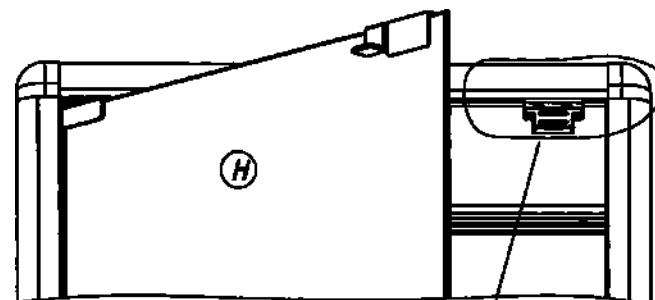

Фиксирующий винт

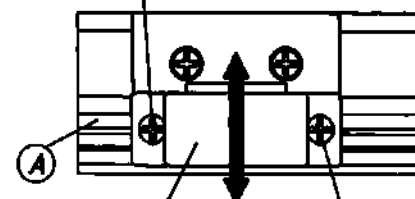

Магнит

Фиксирующий винт

Открыв стеклянную дверь (Н), ослабьте при необходимости фиксирующий винт и сдвиньте в требуемое положение магнит. Завершив регулировку, затяните на магните фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки фиксирующих винтов на магните. Это может привести к порче его корпуса.

Стеклянная дверь в закрытом положении



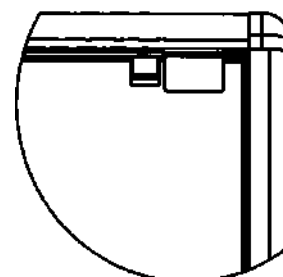


Схема фиксации стеклянной двери магнитом

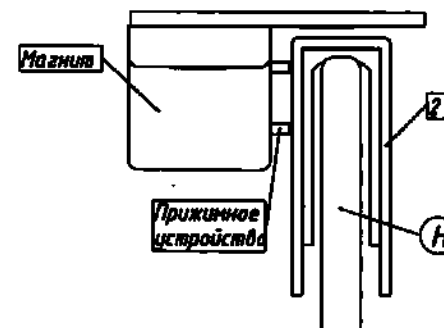

Инструкция по сборке изделия
Шкафы медицинские по ГИКС.942810.107 ТУ
Шкаф медицинский лабораторный (мод.7)

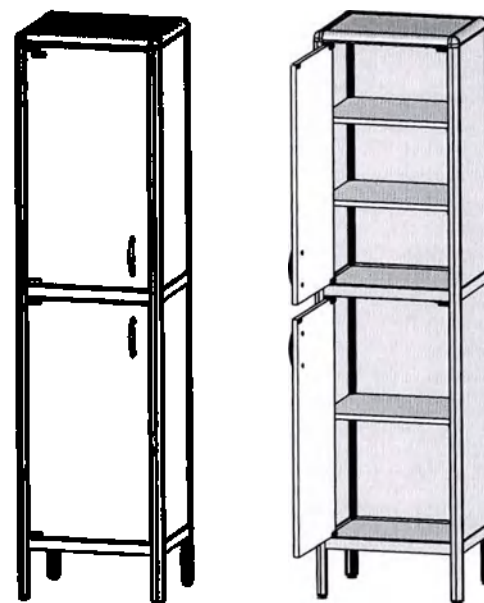

Условные обозначения:

1. А-О : детали

2. 1 - 13 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 15 : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Крышка	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Стенка задняя верхняя	1
Д	Прогон задний	2
Е	Стенка задняя нижняя	1
Ж	Прогон средний передний	1
З	Прогон нижний передний	1
И	Заглушка под магнит	2
К	Заглушка прогона	2
Л	Дно/полка средняя	2
М	Полка	3
Н	Дверь левая нижняя	1
О	Дверь левая верхняя	1

Крепёж и фурнитура


Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	4	Опора	
2	2 комплекта	Петля для дверей из ЛДСП	
3	2	Ответная планка магнита	
4	2 комплекта	Ручка мебельная	
5	6	Саморез 3x12	
6	12	Полкодержатель	
7	1	Заглушка декоративная	
8	2	Площадка магнита	
9	4	Саморез 3x16	
10	2	Защёлка магнитная	
11	1	Логотип компании	
12	1	Ключ шестигранный малый	
13	1	Ключ шестигранный большой	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

ОМ 29.749.01 Произведите сборку крышки

Рекомендации для сборки: разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона и на нем производите сборку деталей и изделия!

1 этап

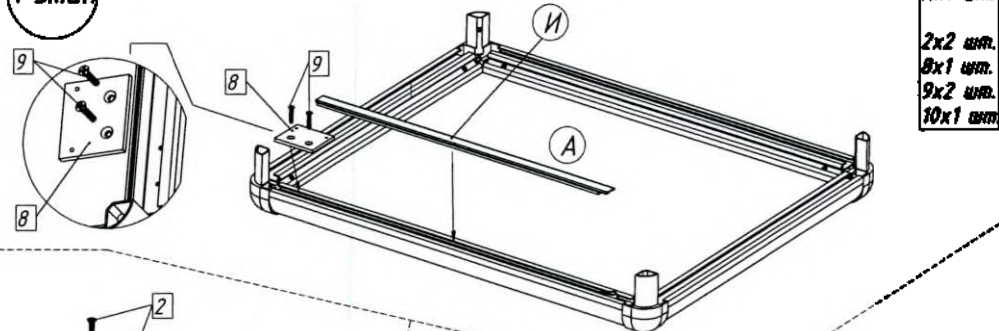

Ах1 шт.
Их1 шт.
2х2 шт.
8х1 шт.
9х2 шт.
10х1 шт.


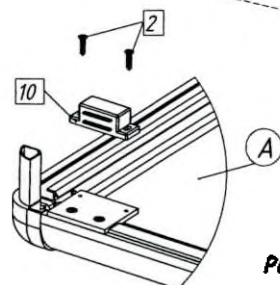


Схема установленных магнитов 10

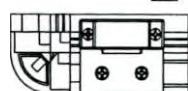

Рекомендуется: магниты не затягивать до упора саморезами 2

Схема установки заглушки (И) в стойку крышки



Схема сборки изделия

6 этап

Произведите установку стенок боковых

Ах1 шт.
Бх1 шт.
Вх1 шт.

Схема фиксации стенок боковых с крышкой изделия

На каждом тройнике **ВЫКРУТИТЬ** по 1-му винту против часовой стрелки на несколько оборотов ключом 12

Соединив боковые стенки с крышкой, обязательно следует **ВЫКРУТИТЬ** указанный винт на каждом тройнике так, чтобы выкрученный винт попал в отверстие на алюминиевой стойке стенки боковой, тем самым закрепив стенки боковые на крышке. При невыполнении данного требования эксплуатация изделия **ЗАПРЕЩЕНА!**

7 этап

Произведите установку стенок и прогонов задних

Схема установки прогонов

Гх1 шт.
Дх2 шт.
Ех1 шт.

Установив прогоны Д, затяните фиксирующие замки до ощутимого сопротивления ключом 13

Произведите установку прогонов передних

8 этап

Перед установкой прогонов Ж и З вытащите края заглушек декоративных из пазов стенок боковых Б и В. После установки прогонов Ж и З вставьте заглушки обратно в пазы профилей

Жх1 шт.
Зх1 шт.

Нижний прогон

Средний прогон


Установив прогоны Ж и З, затяните фиксирующие замки до ощутимого сопротивления ключом 13

Прогон нижний передний З должен быть выровнен с нижними прогонами боковых стенок Б и В. Прогон средний передний Ж должен быть выровнен со средними прогонами боковых стенок Б и В. В результате прогоны Ж и З должны находиться на одном уровне с нижними и средними прогонами стенок боковых Б и В

ОМ 29.749.01 Произведите установку опор путём вкручивания их по часовой стрелке, а так же установите заглушки

9 этап


Опоры 7 следует закручивать
рожковым ключом 10
по часовой стрелке
либо плоскогубцами.
ВНИМАНИЕ: Рожковый ключ 10,
плоскогубцы не входят
в комплект поставки изделия

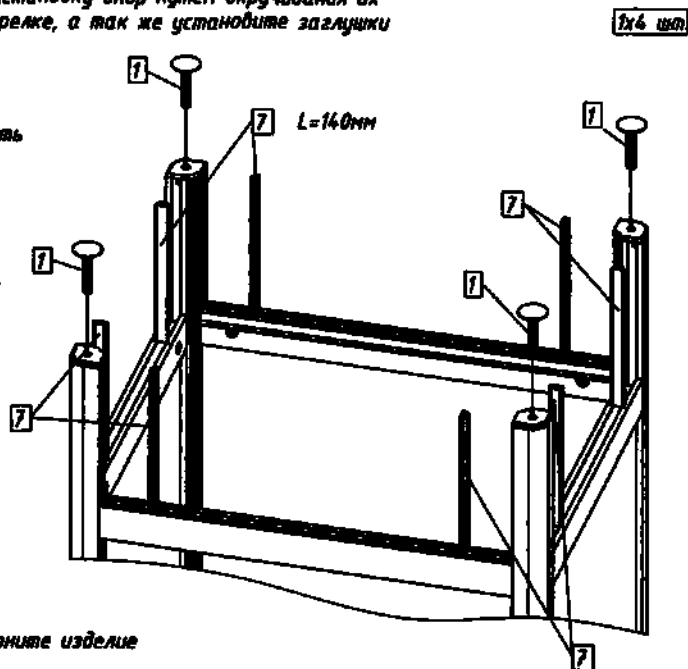

После установки опор переверните изделие
и поставьте его на опоры

Собранный каркас шкафа


10 этап

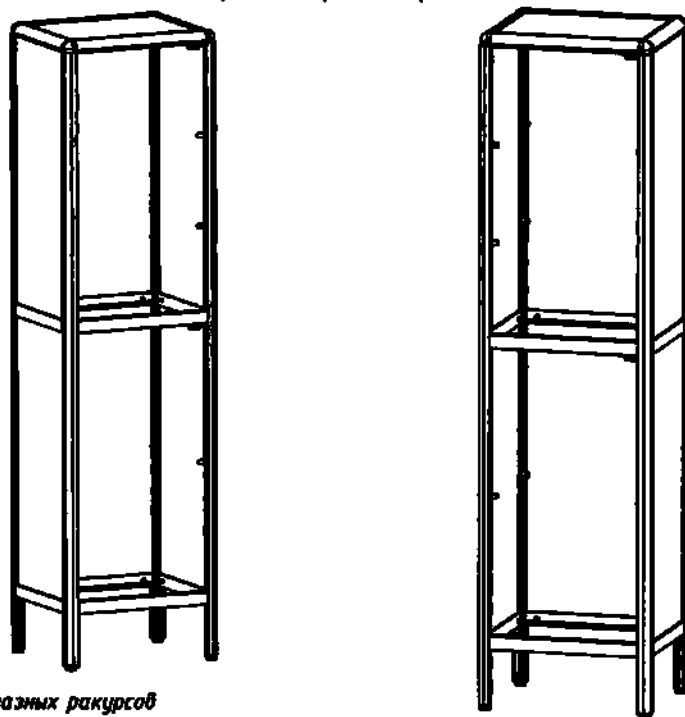


Указаны виды с разных ракурсов

ОМ 29.749.01 Произведите установку полок в нижнее отделение шкафа

11 этап

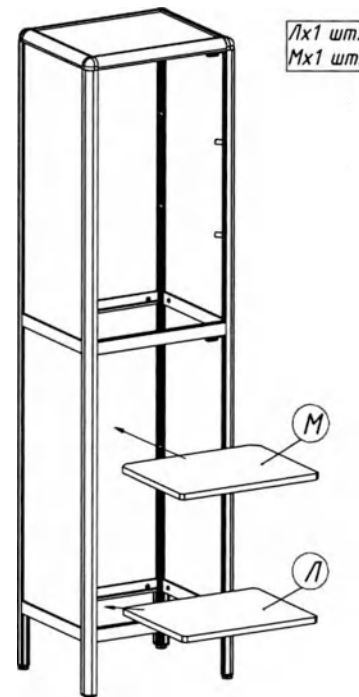


При необходимости положение полки (М)
можно менять путём смещения (регулировкой)
полкодержателей (Л) по вертикали

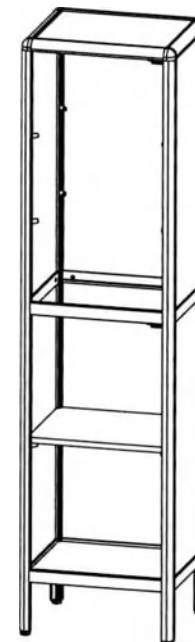


Произведите установку полок
в верхнее отделение шкафа

12 этап

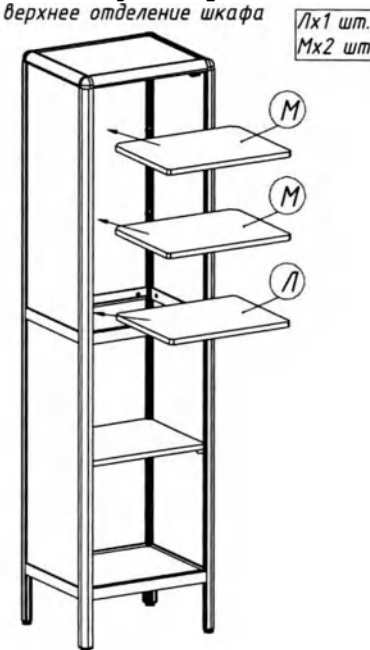


При необходимости положение полок (М)
можно менять путём смещения (регулировкой)
полкодержателей (Л) по вертикали

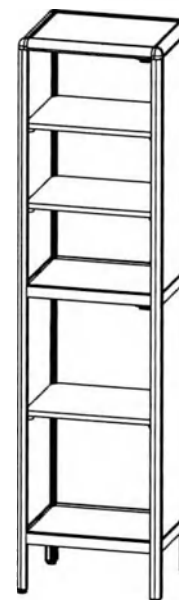

Произведите установку ответной планки магнита и ручки на нижнюю и верхнюю двери из ЛДСП

13 этап

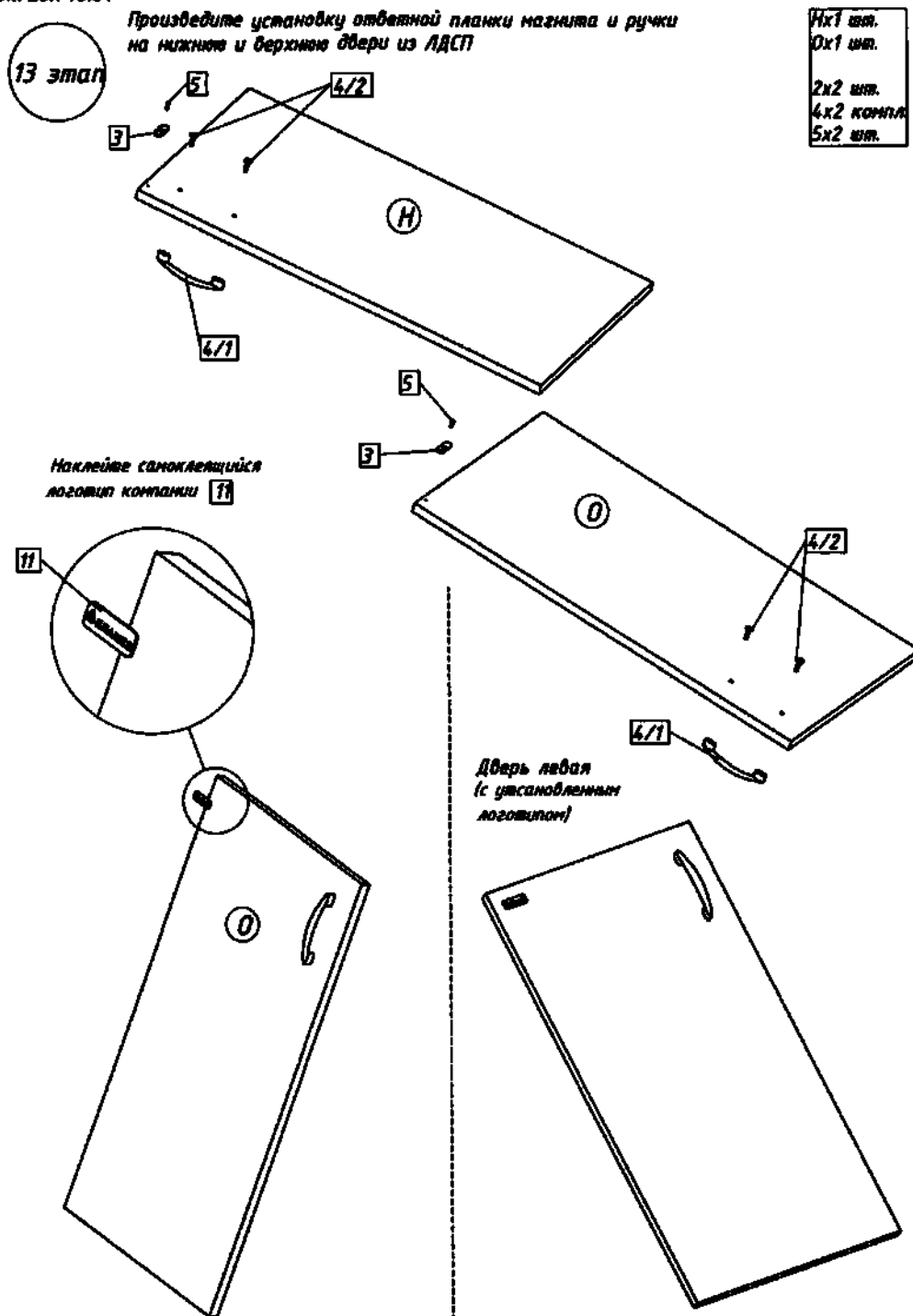

4x1 шт.
0x1 шт.
2x2 шт.
4x2 компл.
5x2 шт.

ВНИМАНИЕ!!


Во избежание повреждения дверей шкафа их установку рекомендуется выполнять сборщикам в количестве 2-х человек. Также перед их установкой необходимо проверить:

- винты зазоров установленных прозоров надежно затянуты, и шкаф не имеет диагональных перекосов;
- наличие в каждой петле 2 пластиковых колпачков на затяжных винтах.


Если хотя бы одно из условий не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНА!!

14 этап

Схема установки двери из ЛДСП

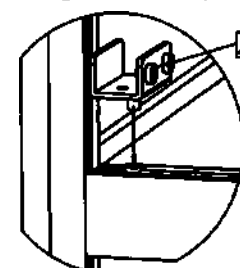


Установите нижнюю петлю 3

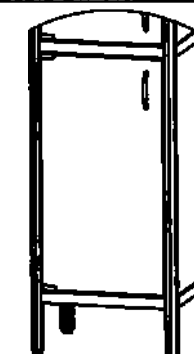


Установленные нижние двери

Схема установки двери в петле

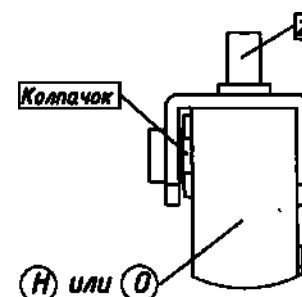

Установив верхнюю петлю 2 и, придерживая её от выпадения, вставьте между петель дверь без перекосов.


4x1 шт.
0x1 шт.
2x2 компл.

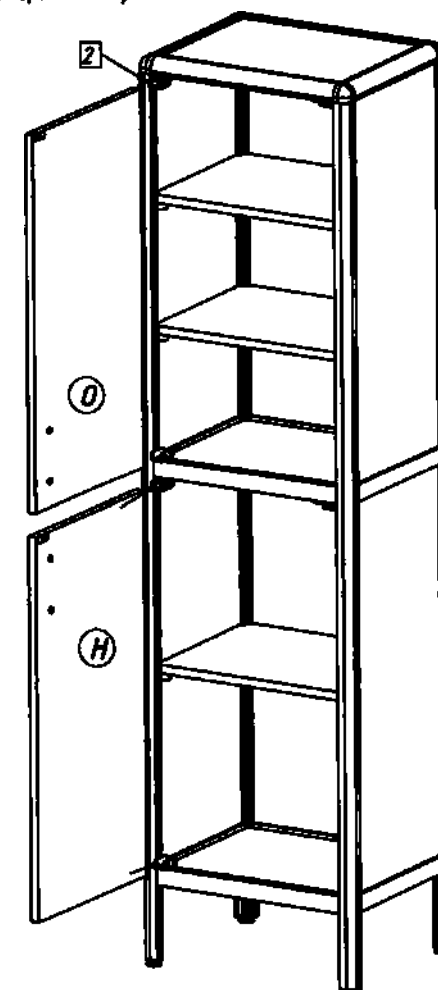

Внимание: Установку дверей производить только в вертикальном положении шкафа. После установки дверей (Н) и (О) необходимо затянуть все фиксирующие винты петель 2 до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов. Это может привести к порче двери.

Шкаф медицинский лабораторный (мод.7)

15 этап

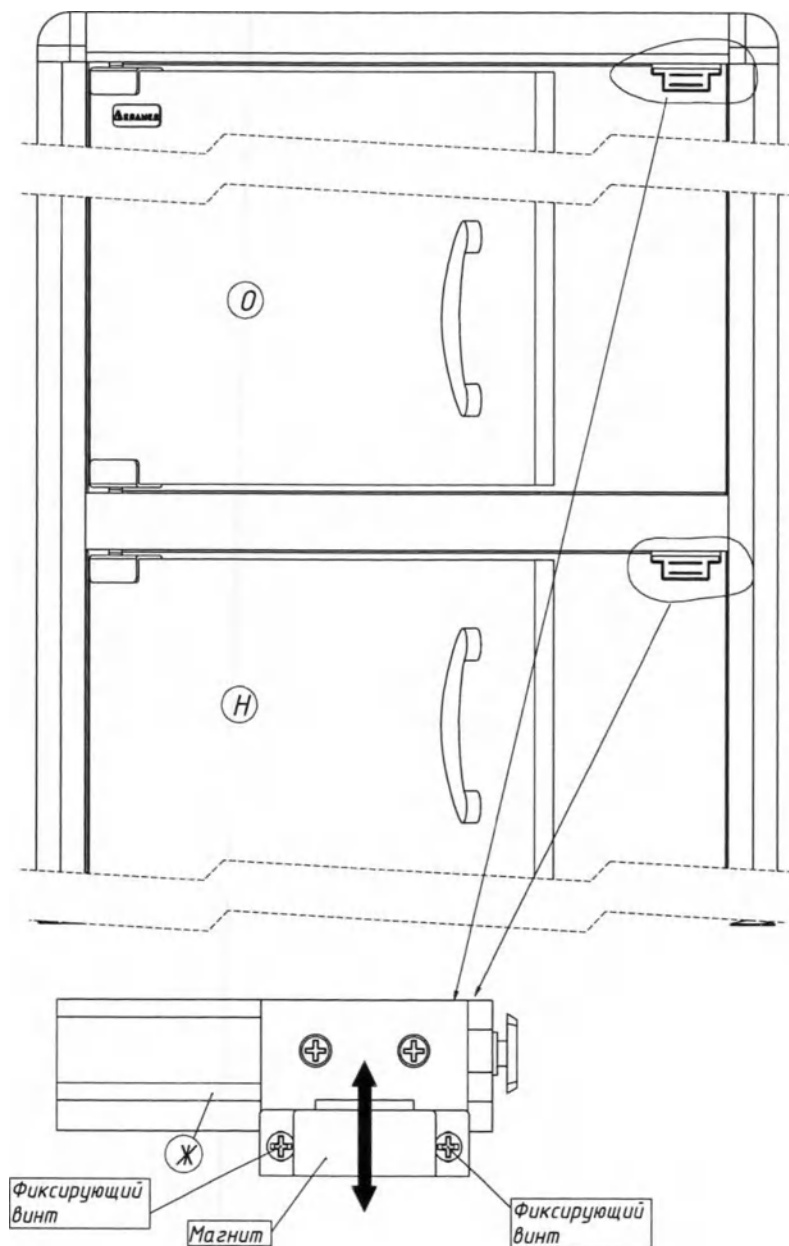

Открыв двери, при необходимости ослабьте фиксирующие винты и сдвиньте в требуемое положение магнит. Завершив регулировку, затяните на магните фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки фиксирующих винтов на магните. Это может привести к порче его корпуса.

Дверь в закрытом положении



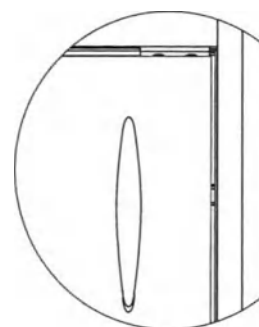


Схема фиксации двери магнитом

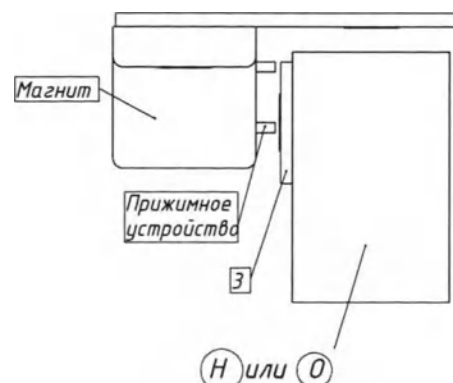

Собранное изделие

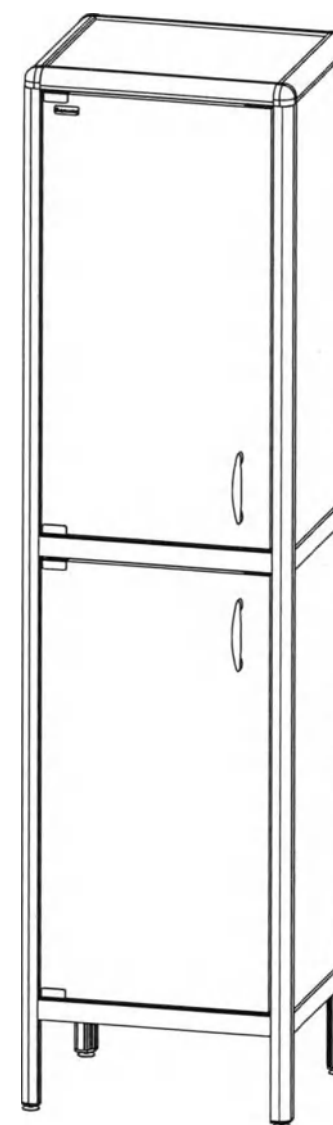


Условные обозначения:

1. А-Ц : детали

2. [7] - [19] : крепёж и фурнитура

3. (1) - (26) : этапы сборки

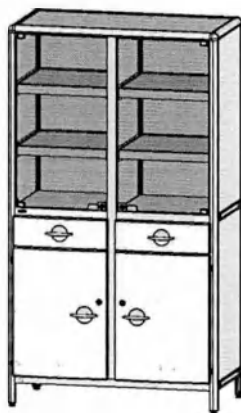

Код 15386

Детали

№	Наименование	Кол - во
А	Крышка	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Стойка передняя	1
Д	Стойка задняя	1
Е	Корпус ящика	2
Ж	Стенка задняя верхняя	2
З	Стенка задняя нижняя	2
И	Перегорodka верхняя	1
К	Перегорodka нижняя	1
Л	Прогон нижний	2
М	Прогон задний	2
Н	Прогон передний левый	1
О	Прогон передний правый	1
П	Прогон центральный	1
Р	Стеклодверца	2
С	Дверь левая	1
Т	Дверь правая	1
У	Полка пластиковая	8
Ф	Полка ЛДСП левая	1
Х	Полка ЛДСП правая	1
Ц	Фасад ящика	2

1

Крепёж и фурнитура


Арт.	Кол - во	Обозначение	
[1]	2	Плитка напольная	
[2]	2	Замок	
[3]	8	Саморез 4,5x16	
[4]	4	Винт М4х25	
[5]	4	Винт М4х30	
[6]	16	Заглушка самоклеящаяся	
[7]	16	Саморез 3,5x19	
[8]	4	Опора	
[9]	2 комплекта	Направляющие	
[10]	4	Ручка	
[11]	2	Магнит	
[12]	24	Полкодержатель	
[13]	4	Штифт латунный	
[14]	2 комплекта	Пята для стеклянных дверей	
[15]	8	Винт М3х6	

2

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
[16]	4	Саморез 3x12	
[17]	1	Ключ шестигранный малый	
[18]	1	Ключ шестигранный большой	
[19]	1	Логотип компании	

Схема сборки изделия

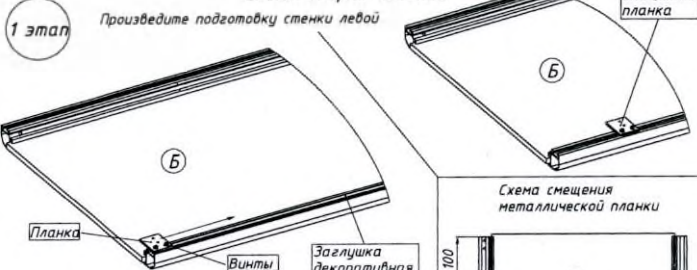


Распаковав упаковку, подготовьте стенку левую (Б) для дальнейшей сборки изделия. Изогните из паза стойки заглушку декоративную. На верхней металлической планке ослабьте 2 винта и сместите планку вниз на 80-120 мм.

Произведите сборку стенки левой



Подготовленная стенка левая для установки на изделие

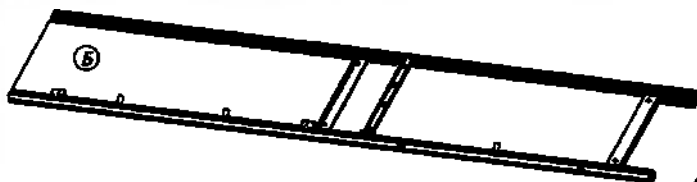


3

4

Old № 29.1212.00


ក្រុមប្រឹក្សានៃ កងកម្លាំងស្រុក តាមក្រុម ក្រសួង

2 3000

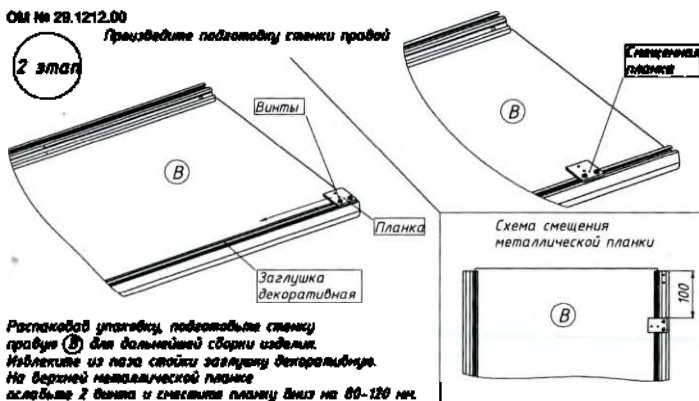


Раскаждов углубилу, подготавиле стенку правуе (8) для дальнейшей сборки изделия. Изделие из паза стойки заложиле деформированное. На верхней металлической пластине ослабили 2 винта и сместили пластину вниз на 80-120 мм.

Грохаведите сберу стених родод

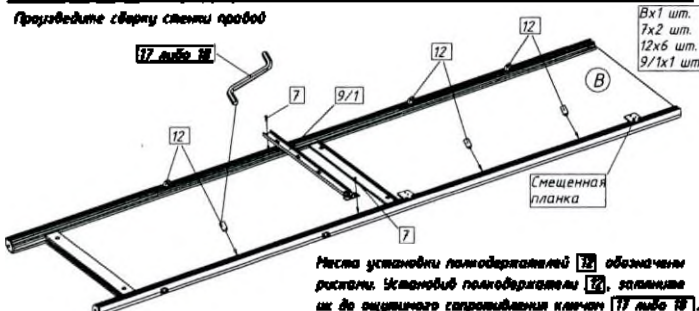


Подготовленная группа прошла все установленные на учебные

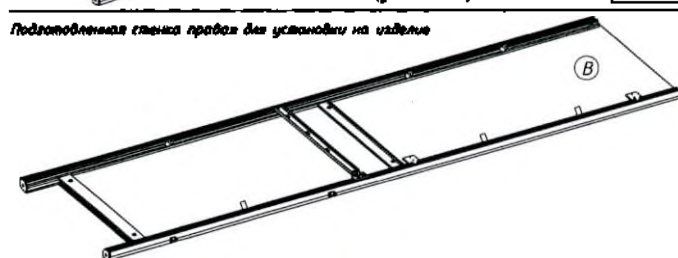

CM H=29.1212.00

Гривна


(5) **अन्य**

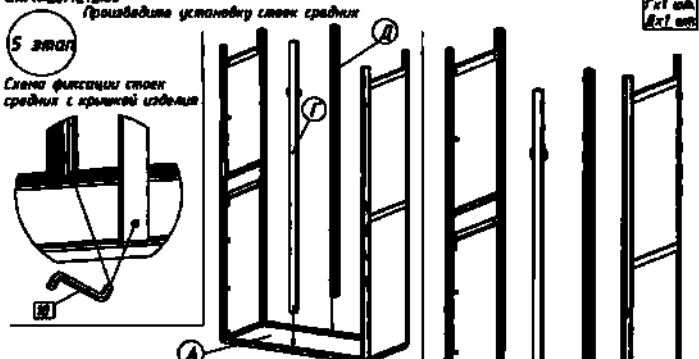

После установки, стойки ① и ② должны располагаться строго по центру относительно проанов на крышке ③. Установочные стойки ① и ② зажимают фиксирующие зажимы до срабатывания сопровождающих ключей ④.

(6) **आयदा**


Произведите установку барных стоек задних и переднюю барную

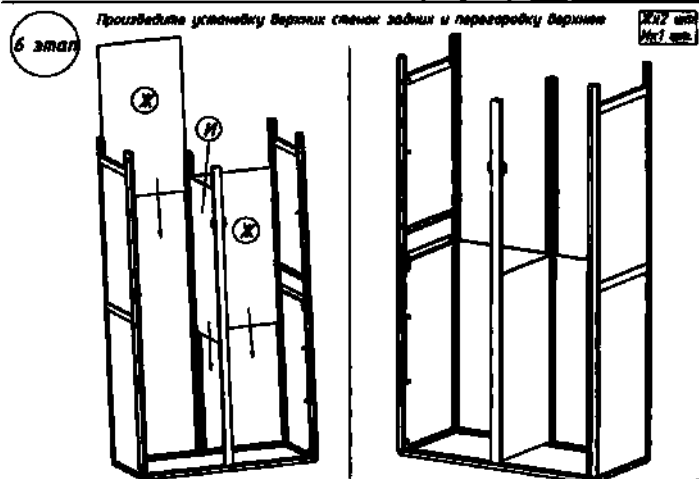

GM № 28.1212.00

Производство продукции сельского хозяйства

(3) **ARGG**

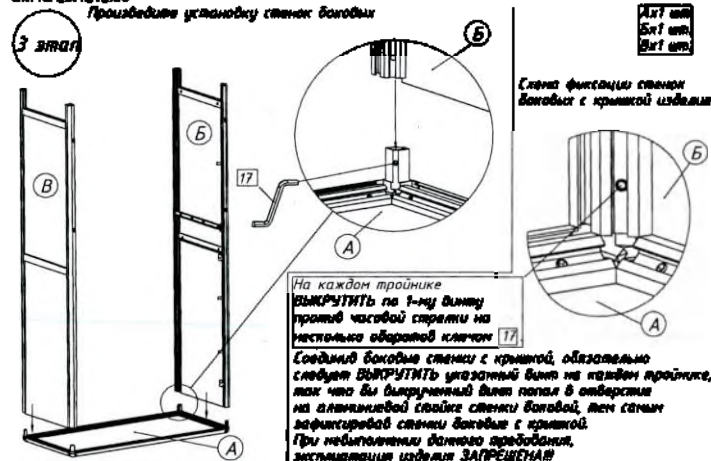


На каждом треугольнике
ВЫКРУТИТЬ по 1-му диаметру
прототип частовой гайки на
стойбище обваренной калканом 17

Стойбища боковых стенок с крышкой, обязательно
следует ВЫКРУТИТЬ указанный диаметр на пятимм. протитипе,
так что бы выкручиваясь диаметр попал в отверстие
на алюминийевой стойке стенок боковой тем самым
зафиксировав стойки боковые с крышкой.

При монтаже стоек боковых необходимо,
использовать изделие ЗАПРЕЖЕНАМ!

Завершила установку систем биосов

(4 этап)

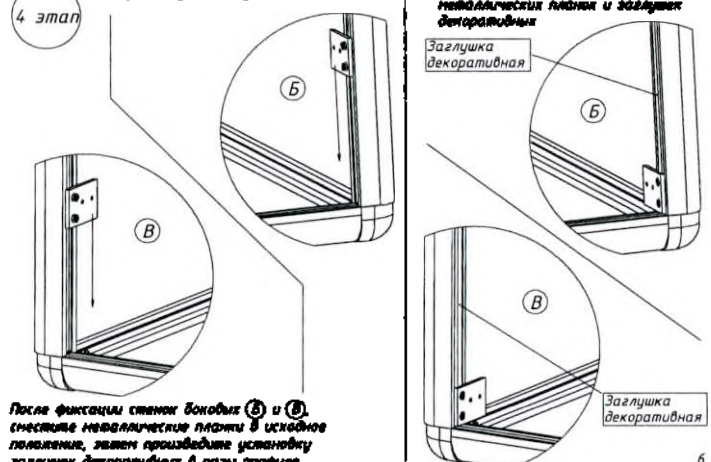


После функции ставим знаки **(6)** и **(8)**.
Сместив незначительную лямбду в исходное
положение, затем произведем установку
подписки **двухзначных** в поле **поиска**.

CM H=29.1212.00

Гривабидагга устанидир ланг гравина


(5) **अन्य**

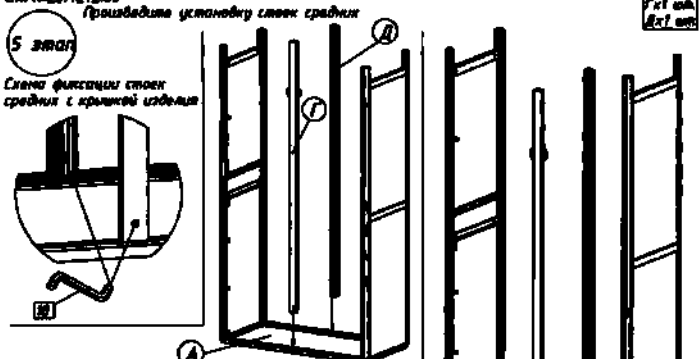

После установки, стойки ① и ② должны располагаться строго по центру относительно проанов на крышке ③. Установочные стойки ① и ② зажимают фиксирующие зажимы до срабатывания сопровождающих ключей ④.

(6) **आयदा**


Произведите установку барных стоек задних и переднюю барную

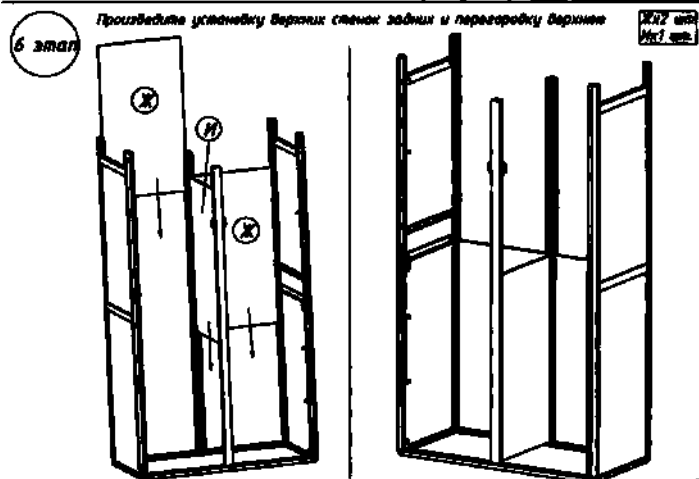

OM № 29.1212.00


ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಬೋಧಿಸುವ

(7) **Задание**

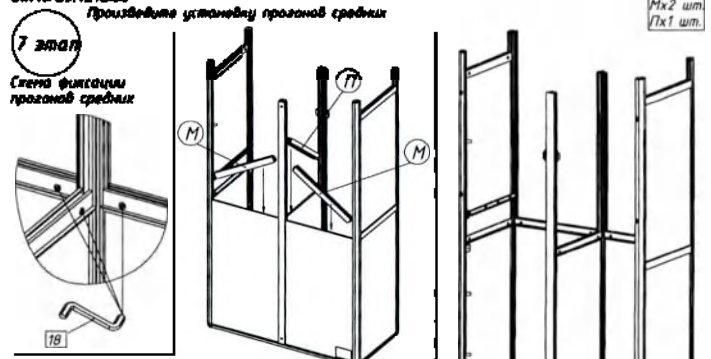

После установления, что протоны (H) и (H) должны располагаться на одном уровне относительно плоскости графитовых протонов, не следует ожидать (B) и (B). Установив протоны (H) и (H), заменив функционирующие протоны до оптимального соотношения, можно получить (B).

Производители установили прогонцов среднели парадных

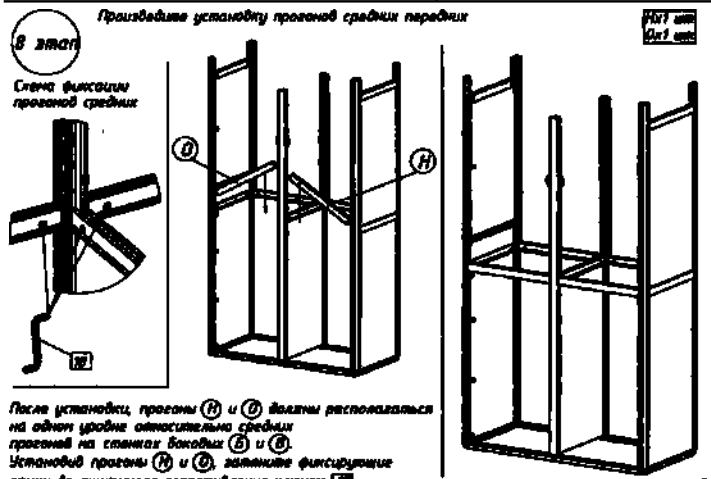


После установки, проемы $\textcircled{H}$ и $\textcircled{D}$ должны располагаться на одном уровне относительно средних проемов на стенках боковых $\textcircled{B}$ и $\textcircled{E}$. Установив проемы $\textcircled{H}$ и $\textcircled{D}$, зажимают фиксирующие зажимы до окончательного сопоставления клямчен $\textcircled{A}$.

ОМ №29.1212.00

Произведите установку направляющих на средние стойки

7x4 мм
9/1x2 мм

9 этап

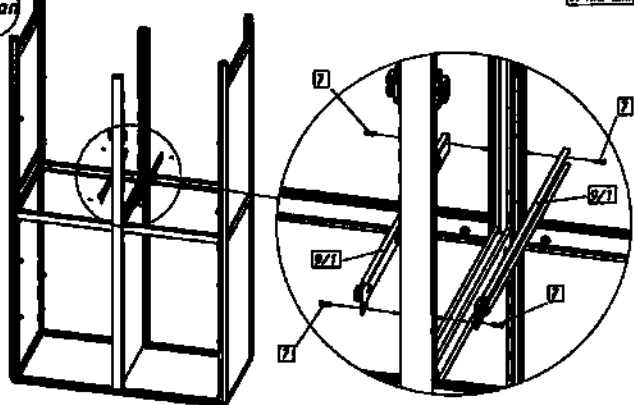


ОМ №29.1212.00

Произведите установку прогона нижнего переднего



4x1 мм

11 этап

Схема фиксации прогона нижнего

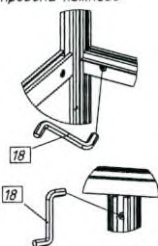



Перед установкой прогона (18) следует выкрутить винт замка в стойке (7) и вставить Т-образный штифт. Вставить штифт в паз прогона (18), другим концом в замок стойки (7), совместив оверстак в штифте, замок и вынуть замок. Закрепить прогон винтом замка с помощью ключа (18). После установки прогон (18) должен располагаться на одном уровне относительно нижних прогонов на стенках боковых (6) и (8). Установив прогон (18) затяните фиксацию замка до ощутимого сопротивления ключом (18).

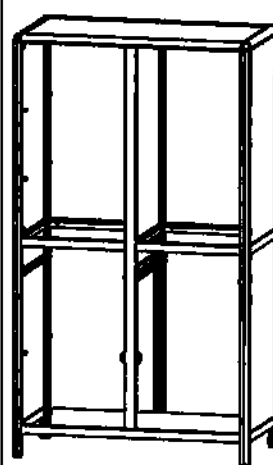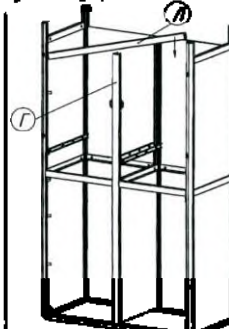

Произведите установку полокдержателей на средние стойки

12x12 мм

12 этап

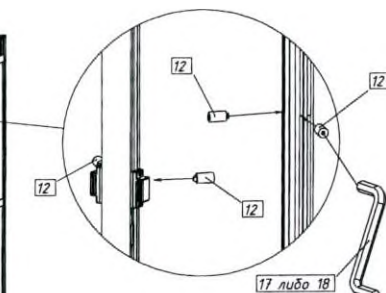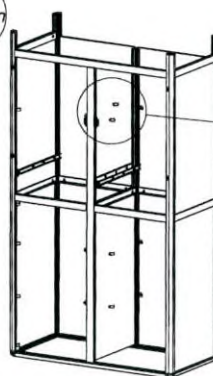


Места установки полокдержателей (12) обозначены рисками. Установив полокдержатели (12), затяните их до ощутимого сопротивления ключом (17 либо 18).

ОМ №29.1212.00

Произведите установку перегородки нижней

4x1 мм

13 этап

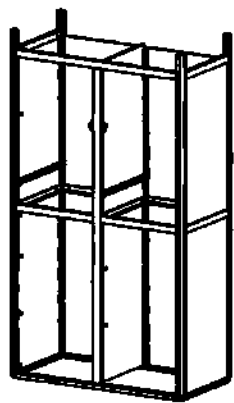


ОМ №29.1212.00

Произведите установку опор

10x4 мм

15 этап

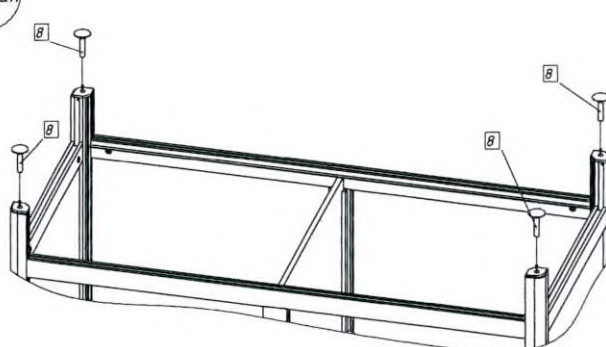



ОМ №29.1212.00

Произведите установку прогона нижнего заднего

4x1 мм

14 этап

Схема фиксации прогона нижнего

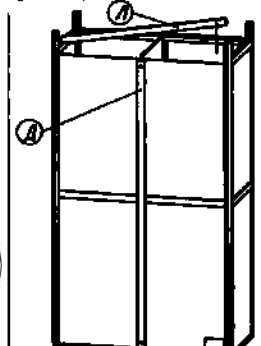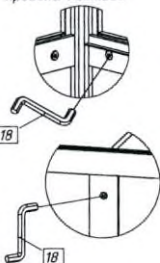

Перед установкой прогона (18) следует выкрутить винт замка в стойке (7) и вставить Т-образный штифт. Вставить штифт в паз прогона (18), другим концом в замок стойки (7), совместив оверстак в штифте, замок и вынуть замок. Закрепить прогон винтом замка с помощью ключа (18). После установки прогон (18) должен располагаться на одном уровне относительно нижних прогонов на стенках боковых (6) и (8). Установив прогон (18) затяните фиксацию замка до ощутимого сопротивления ключом (18).





16 этап

Произведите сборку полок средних

Левая

Правая

10x1 мм
11x1 мм
17x2 мм
18x4 мм

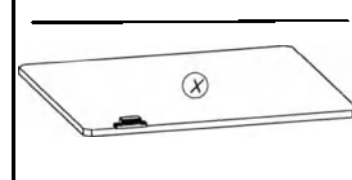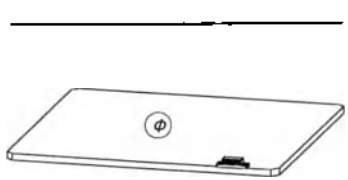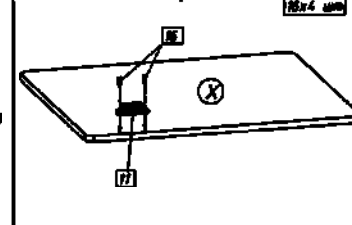
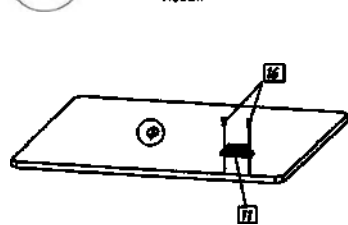


СИ №29.1212.00

Произведите установку
полки средней

ФхЛ шт.
2х1 шт.

17 этап

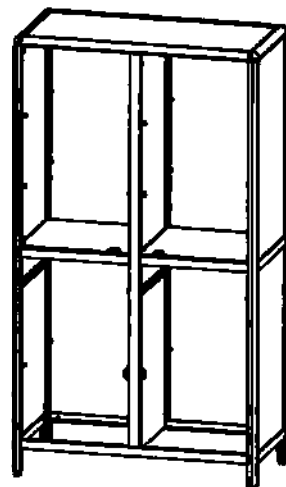
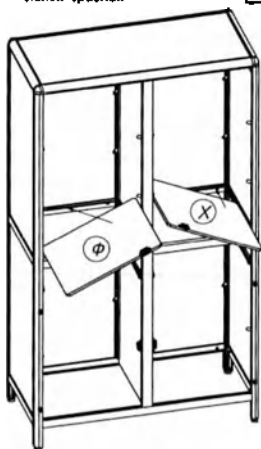


СИ №29.1212.00

Произведите установку
верхней полки

ФхЛ шт.
1х1 шт.
1х2 шт.



19 этап

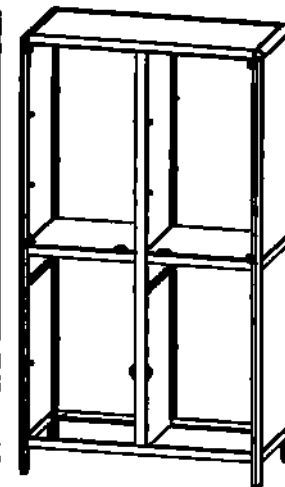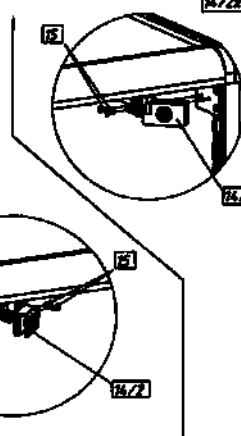

18 этап

Произведите установку
нижней полки



ФхЛ шт.
1х1 шт.
1х2 шт.

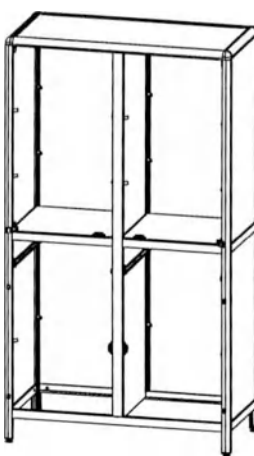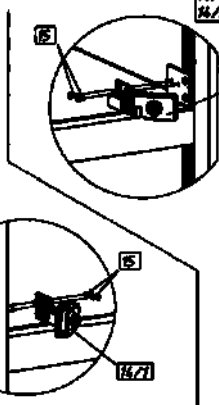

20 этап


Произведите установку
пластиковых полок

ФхЛ шт.

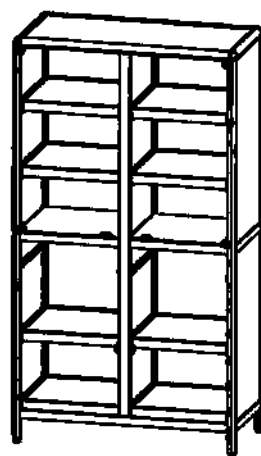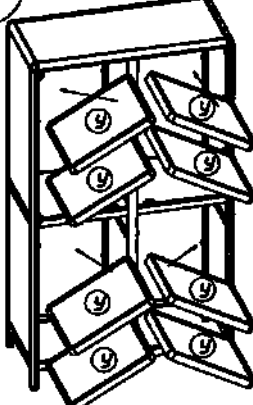


СИ №29.1212.00 Схема установки дверей нижних

21 этап

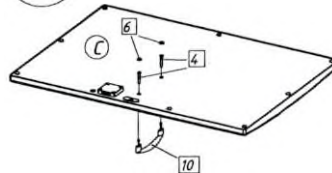


СИ №29.1212.00 Схема установки ящиков

22 этап

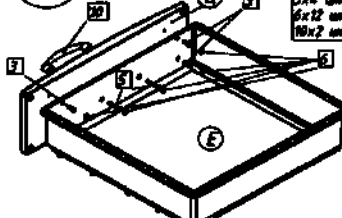

СИ №29.1212.00 Схема установки направляющих

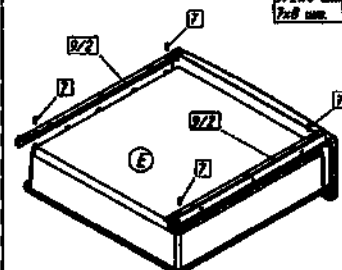

Произведите сборку двери (С)

Произведите сборку двери (Т)

Установленные двери нижних

Установленные ящики




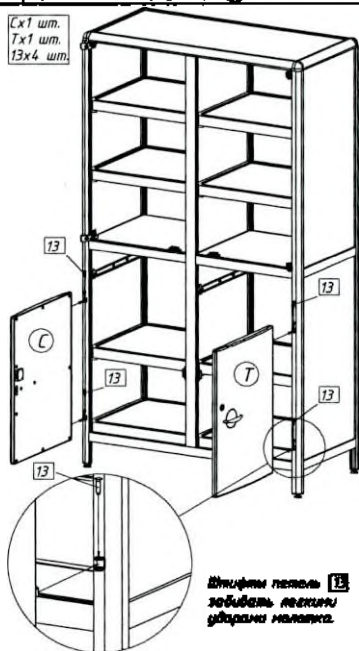


Схема закрытых дверей нижних

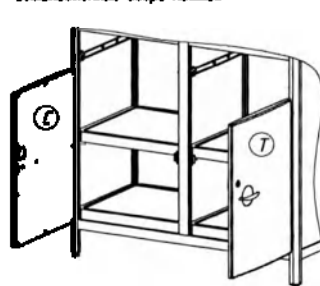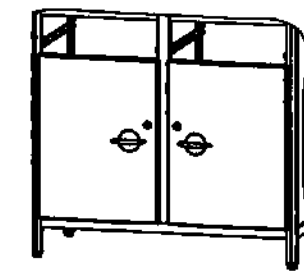


Произведите сборку 2-х ящиков выдвинутых

Произведите установку направляющих

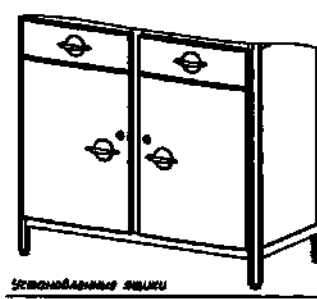

Установленные ящики


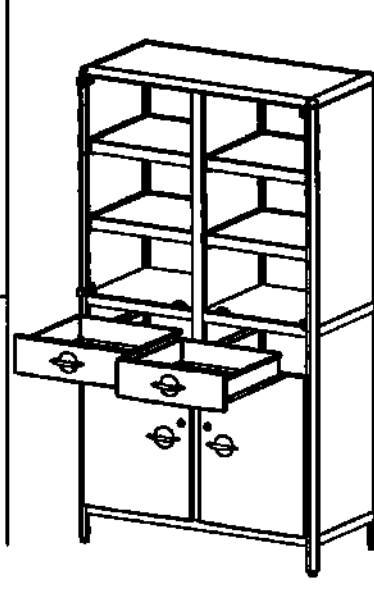


Внимание: Установку дверей производить только в вертикальном положении шкафа.

Внимание: Установку ящиков производить только в вертикальном положении шкафа.


ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание повреждения дверок шкафа, их установку рекомендуется выполнять сборщикам в количестве 2-х человек, а так же перед их установкой необходимо проверить:
- винты замков установленных прогонов надежно затянуты, и шкаф не имеет диагональных перекосов;
- наличие в каждой петле 14/1 и 14/2 пластиковых прокладок и колпачков на затяжных винтах;
- если хотя бы одно из условий не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНА!!!

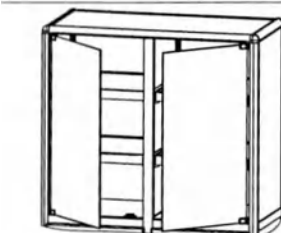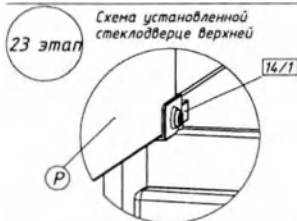



Установленные верхние стеклодверцы

Схема установки стеклодверцы в петлю

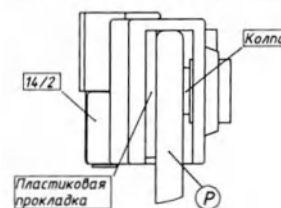

Внимание: Установку стекла производить только в вертикальном положении шкафа. После установки стеклодверцы (P) необходимо затянуть все фиксирующие винты петель 14/1 и 14/2 до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов, это может привести к порче стеклянной дверцы.

Вставьте между петлей 14/1 и 14/2, стеклодверцы без перекосов.

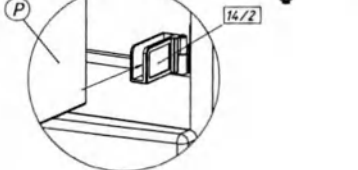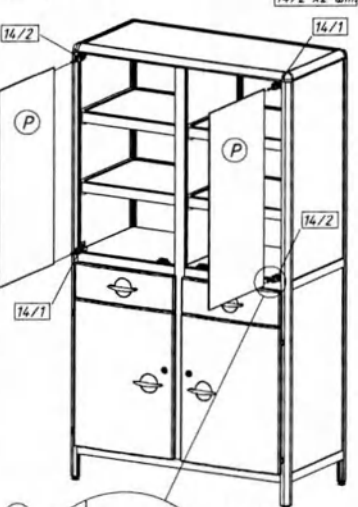


17

Произведите установку замков и металлических планок на верхние стеклодверцы


1x2 шт.
2x2 шт.

24 этап

Схема затяжки винтов на замке 2 стеклодверцы

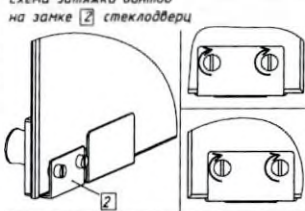

Стеклодверцы в закрытом положении

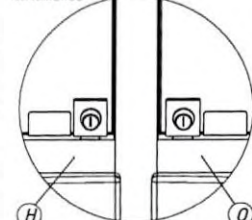


Установив на стеклодверцы замки 2 и металлические планки 1, отрегулируйте их положение таким образом, что бы при закрытых стеклодверцах (P) язычок каждого замка 2 попадал в паз средних прогонов (O) и (H), металлические планки 1 всей поверхностью соприкасались с магнитами, замки 2 не препятствовали свободному закрыванию/открыванию стеклодверцы (P). После регулировки на стекле планок 1 сожмите их для обеспечения фиксации. Затяните на замках фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерного сжатия планок и затяжки винтов на замках, это может привести к порче стеклянной дверцы. При необходимости возможна регулировка магнитов, см. Этап 25.

Ответную планку замка 2, входящую в комплект поставки, в изделие не использовать.

18

Регулировка магнитов на средних прогонах

25 этап

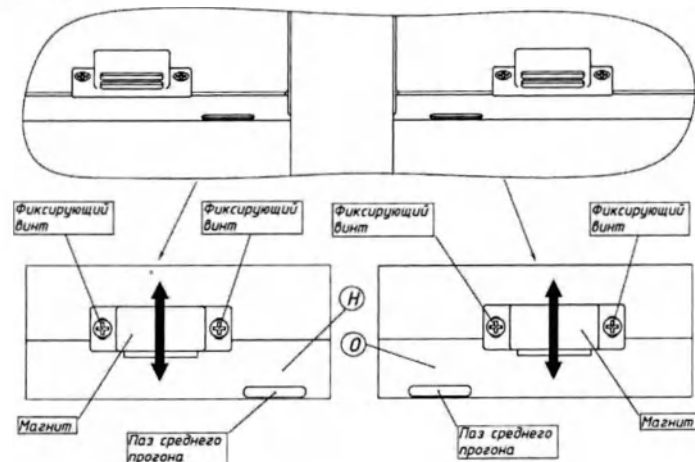

Открыв стеклодверцы (P) ослабьте фиксирующие винты, и сдвиньте в требуемое положение оба магнита. По завершению регулировки, затяните на магнитах фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки фиксирующих винтов на каждом из магнитов, это может привести к порче его корпуса.

Стеклодверцы в закрытом положении


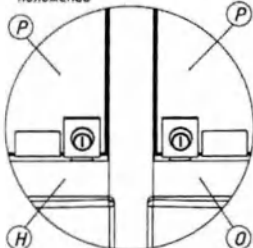



Схема фиксации стеклодверцы магнитом

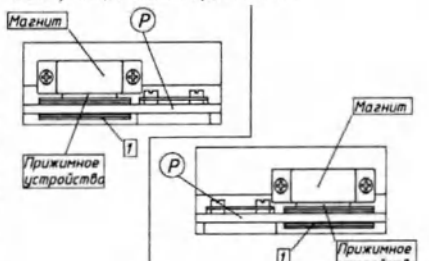

19

После сборки изделия наклейте самклеющийся логотип компании

26 этап

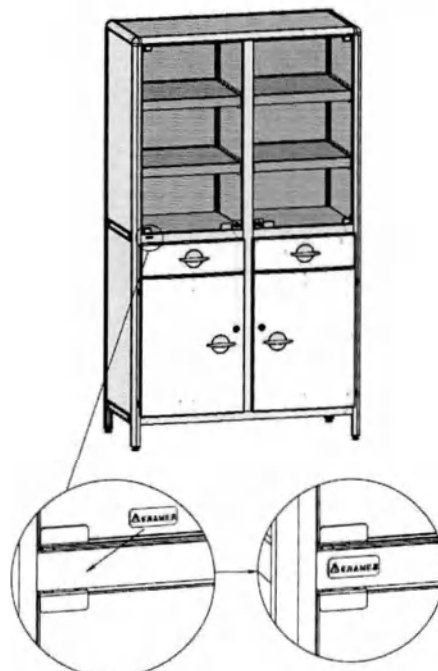


20

Условные обозначения:

1. А-Ц : детали

2. [1] - [19] : крепёж и фурнитура

3. ① - ②6 : этапы сборки

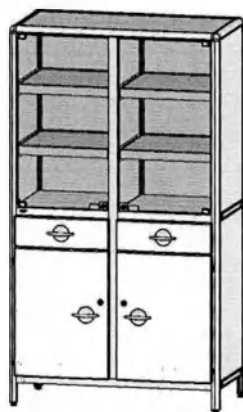

Код 15387

Детали

№	Наименование	Кол - во
А	Крышка	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Стойка передняя	1
Д	Стойка задняя	1
Е	Корпус ящика	2
Ж	Стенка задняя верхняя	2
З	Стенка задняя нижняя	2
И	Перегородка верхняя	1
К	Перегородка нижняя	1
Л	Прогон нижний	2
М	Прогон задний	2
Н	Прогон передний левый	1
О	Прогон передний правый	1
П	Прогон центральный	1
Р	Стеклодверца	2
С	Дверь левая	1
Т	Дверь правая	1
У	Полка пластиковая	8
Ф	Полка ЛДСП левая	1
Х	Полка ЛДСП правая	1
Ц	Фасад ящика	2

1

Крепёж и фурнитура


Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	2	Планка монтажная	
2	2	Замок	
3	8	Саморез 4,5x16	
4	4	Винт М4x25	
5	4	Винт М4x30	
6	16	Заглушка самонавинчивающаяся	
7	16	Саморез 3,5x13	
8	4	Опора	
9	2 комплекта	Направляющие	
10	4	Ручка	
11	2	Нажим	
12	24	Полкодержатель	
13	4	Винты петли	
14	2 комплекта	Петли для стеклянных дверей	
15	8	Винт М3x6	

2


Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
16	4	Саморез 3x12	
17	1	Ключ шестигранный малый	
18	1	Ключ шестигранный большой	
19	1	Логотип компании	


Схема сборки изделия

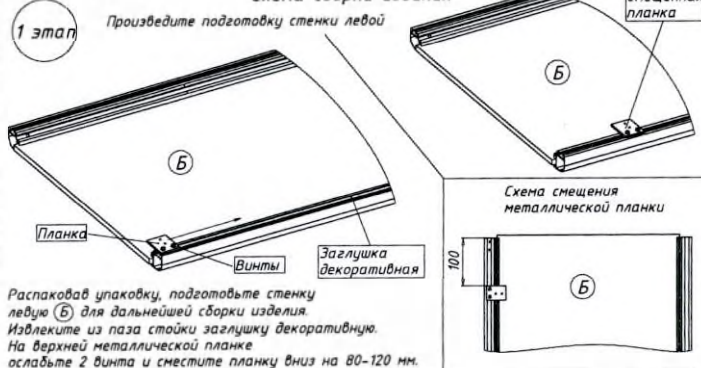

Произведите сборку стенки левой

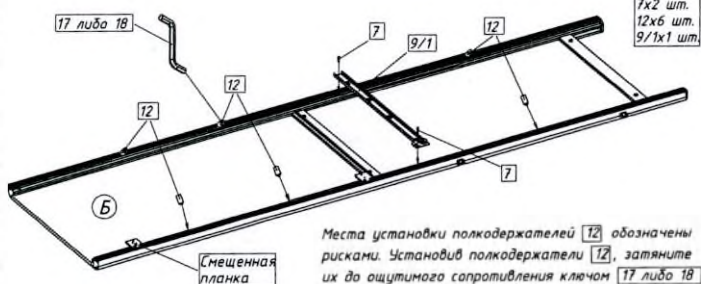

Подготовленная стенка левая для установки на изделие

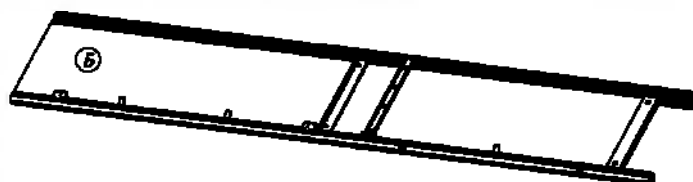

3


4

OM № 29.1213.00

Произведите установку направляющих на средние стойки

7x4 мм
9/16x2 мм

9 этап

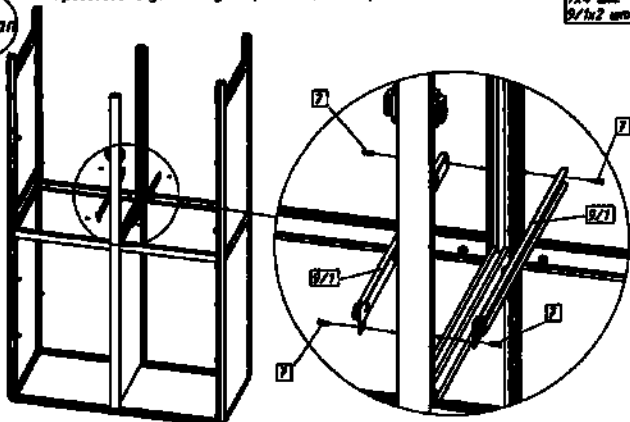

OM № 29.1213.00

Произведите установку прогона нижнего переднего

1x1 мм

11 этап

Схема фиксации прогона нижнего




Перед установкой прогона (11) следует выкрутить винт зажима в стойке (7) и вставить T-образный штифт. Вставить штифт в паз прогона (11), другим концом в зажим стойки (7) соединить отверстие в штифте, зажим и втулку зажима. Закрепить прогон винтом зажима с помощью ключа (18). После установки прогона (11) болванки располагаться на одном уровне относительно нижних прогонов на стенках боковых (5) и (6). Установив прогон (11) закончите фиксирование зажима до ощутимого сопротивления ключом (18).

Произведите установку нижних стенок задних

3x2 мм


10 этап

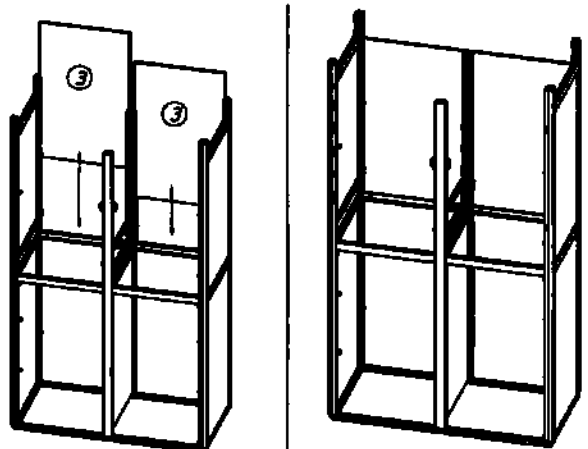

Произведите установку полок-держателей на средние стойки

12x12 мм

12 этап

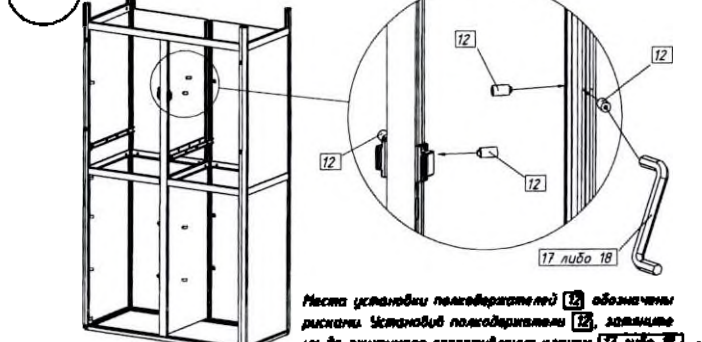


На этапе установки полок-держателей (12) обозначены риски. Установив полки-держатели (12), зажмите их до ощутимого сопротивления ключом (17 либо 18).

OM № 29.1213.00

Произведите установку перегородки нижней

1x1 мм

13 этап

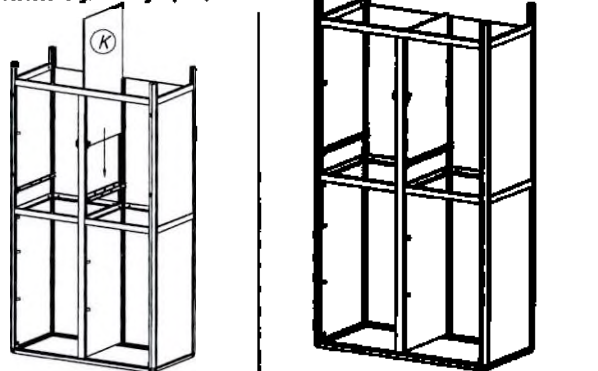


Произведите установку прогона нижнего заднего

1x1 мм

14 этап

Схема фиксации прогона нижнего

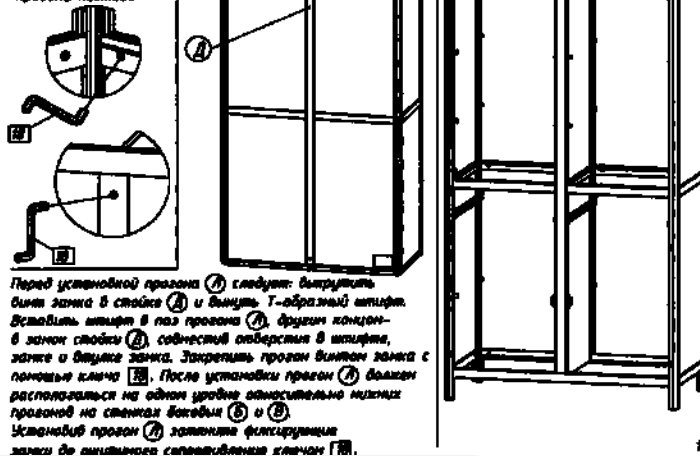


Перед установкой прогона (14) следует выкрутить винт зажима в стойке (1) и вставить T-образный штифт. Вставить штифт в паз прогона (14), другим концом в зажим стойки (1) соединить отверстие в штифте, зажим и втулку зажима. Закрепить прогон винтом зажима с помощью ключа (18). После установки прогона (14) болванки располагаться на одном уровне относительно нижних прогонов на стенках боковых (5) и (6). Установив прогон (14) закончите фиксирование зажима до ощутимого сопротивления ключом (18).

OM № 29.1213.00

Произведите установку опор


1x4 мм

15 этап

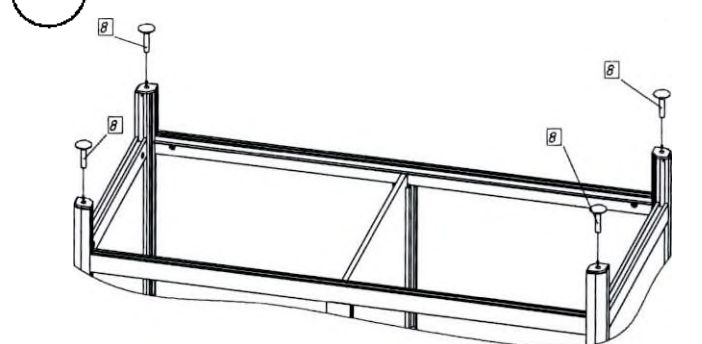

Произведите сборку полок средних

16 этап

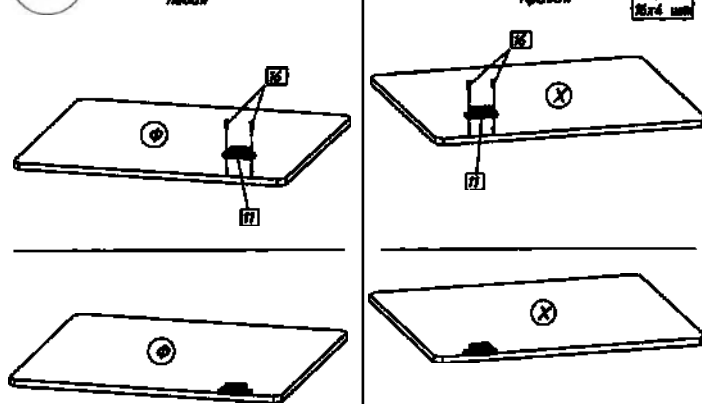



1x1 мм
1x1 мм
1x1 мм
1x1 мм

ОМ №29.1213.00

Произведите установку
полки средних

4x1 шт.
16x1 шт.

17 этап

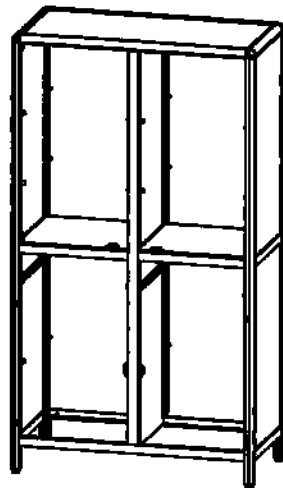
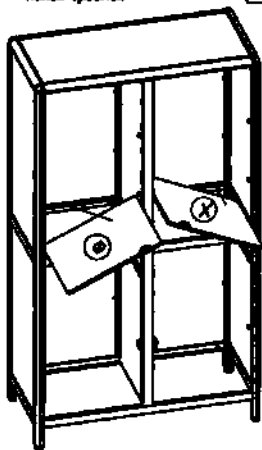


ОМ №29.1213.00

Произведите установку
вертикальной панели

16x4 шт.
16/1x1 шт.
16/2x1 шт.



19 этап

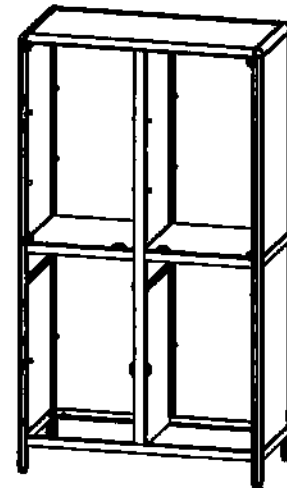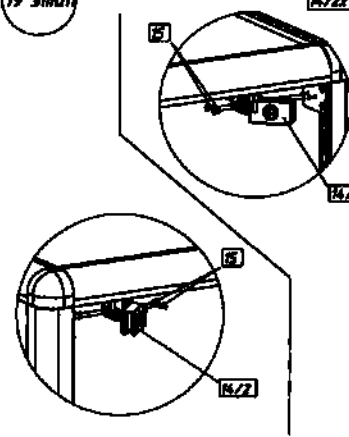

18 этап

Произведите установку
нижней панели



16x4 шт.
16/1x1 шт.
16/2x1 шт.

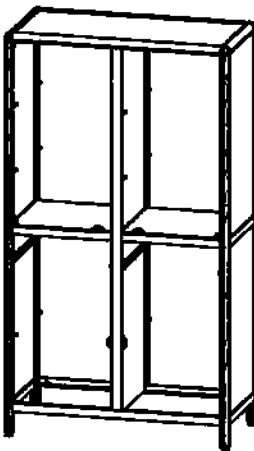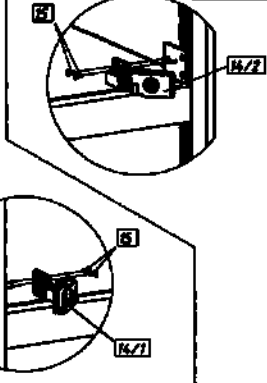

20 этап

Произведите установку
пластиковых полок

50x8 шт.

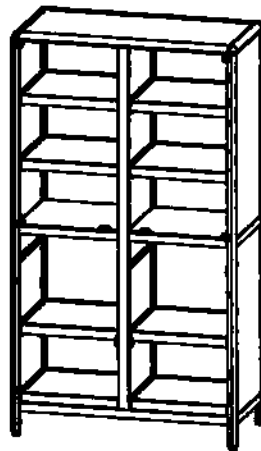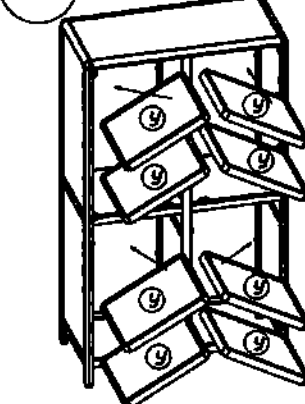


ОМ №29.1213.00


Схема установки дверей нижних

21 этап

5x1 шт.
7x1 шт.
6x4 шт.
10x2 шт.

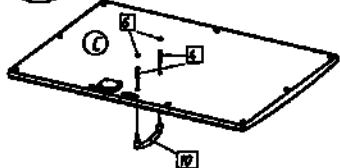

Произведите сборку двери (C)

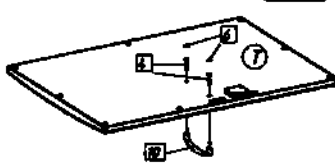

Произведите сборку двери (D)

Установленные двери нижних



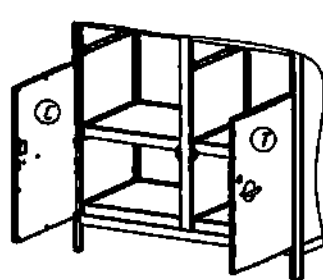


Схема закрытых дверей нижних

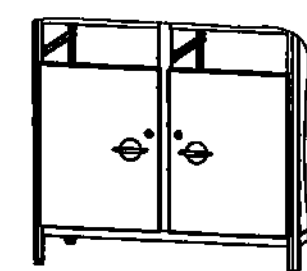

5x1 шт.
7x1 шт.
13x4 шт.

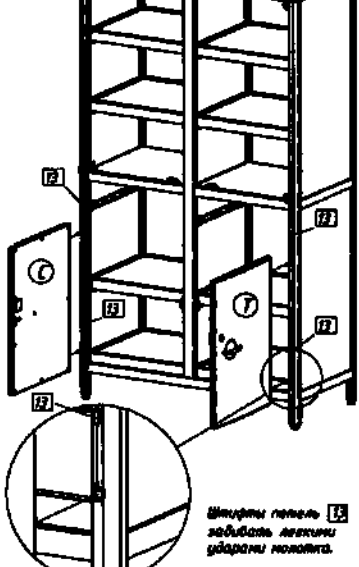

Штифты панели (E)
забивать легкими
ударами молотка.


Внимание: Установку дверей производить только в вертикальном положении шкафа.

ОМ №29.1213.00


Схема установки ящиков

22 этап


5x2 шт.
11x2 шт.
3x8 шт.
5x4 шт.
16x12 шт.
10x2 шт.

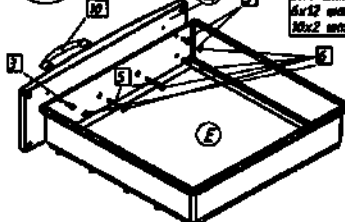

Произведите сборку 2-х ящиков выдвижных


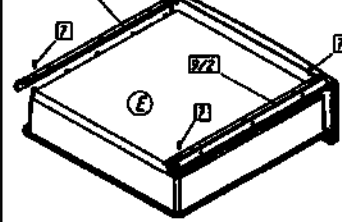


Произведите установку направляющих

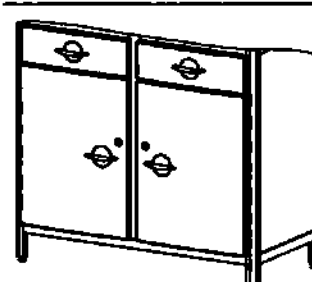

Установленные ящики

Схема установки ящиков

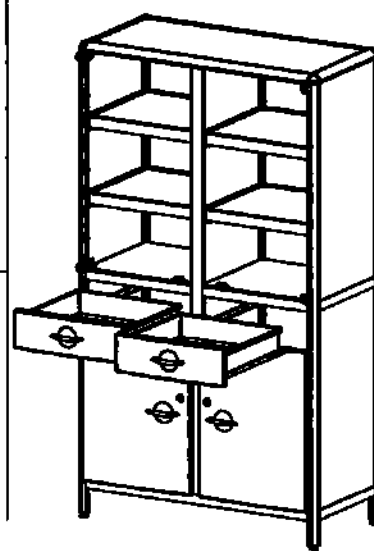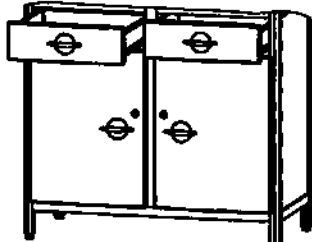

Внимание: Установку ящиков производить только в вертикальном положении шкафа.

ВНИМАНИЕ!



Во избежание повреждения дверей шкафа, их установку рекомендуется выполнять **свертывая в количестве 2-х человек**, в том же перед их установкой необходимо проверить:
- **биты заготов установленный проклад на заготовке, и шпатель**
- **на шпатель выложить ленту;**
- **наложить в каждой петле [14/2] и [14/2] пластиковые прокладки и наложить на заготовку биты;**
- **если хотя бы одно из условий не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНА!**

23 этап

Стекло установленное
стеклодержателем


Вставьте между петлей [14/2] и [14/2], стеклодержатель без перемычки

14/2 мм
14/1 x 2 мм
14/2 x 2 мм

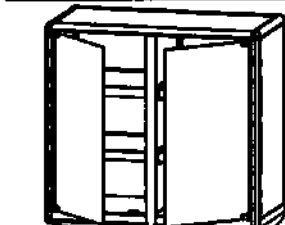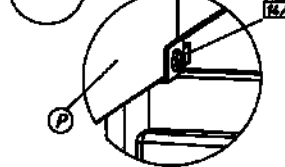

Установленные вертикальные стеклодержатели


Схема установки стеклодержателя в петлю

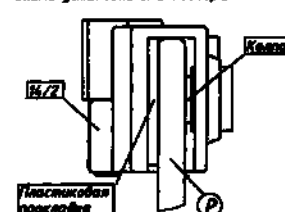

Внимание: Установку стекла производить только в вертикальном положении шкафа. После установки стеклодержателя [14/2] необходимо закрутить все фиксирующие винты петель [14/2] и [14/2] до ощутимого сопротивления. Осторожно проверьте размер заготовки биты, это может привести к порче стеклянной двери.

Разборка наливов на средних пролетах



25 этап

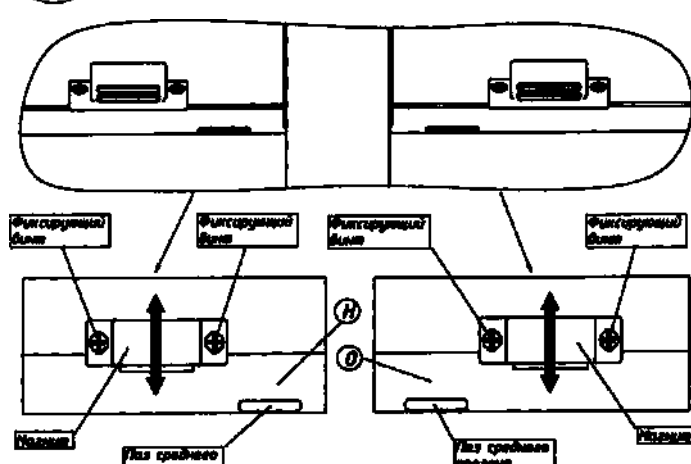

Открыть стеклодержатель [14/2] ослабить фиксирующие винты и сдвинуть в предельное положение оба наливника. По завершению разгрузки, заготовку на наливнике [14/2] до ощутимого сопротивления. Осторожно проверьте размер заготовки биты, это может привести к порче стеклянной двери.

Стеклодержатель в закрытом положении

Схема фиксации стеклодержателя наливником

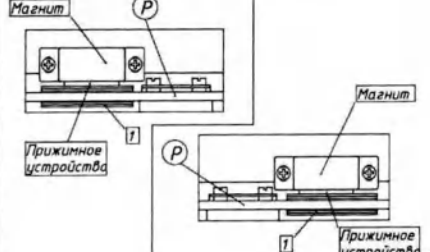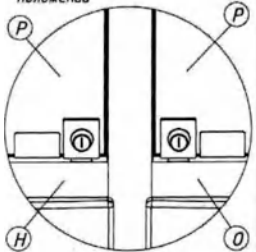


Производство установки замков и металлических планок на дверные стеклодержатели


14/2 мм
2x2 мм

24 этап

Схема затяжки винтов на замке [2] стеклодержателя

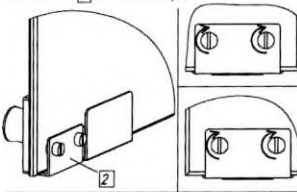

Стеклодержатель в закрытом положении

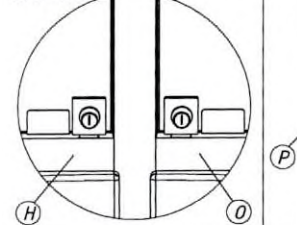


Установкой на стеклодержатель замка [2] и металлических планки [1], обеспечивается их положение таким образом, что бы при закрытии стеклодержателя [2] язычок каждого замка [2] попадал в паз средней прокладки [14/2] и [14/2] металлических планки [1] всей поверхностью соприкасались с наливниками, замки [2] не представляли свободному закрыванию/открыванию стеклодержателя [2]. После разгрузки на стекле планка [1] соединяет их для дополнительной фиксации. Заготовки на замках фиксируются винтами до ощутимого сопротивления. Осторожно проверьте размер заготовки биты, это может привести к порче стеклянной двери. При необходимости возможна разгрузка наливников, см. Этап 25.


Отвернуть планку замка [2], обеспечивая в комплекте наливники, в изделии не использовать.

После сборки изделия наклейте самоклеящийся логотип компании

26 этап

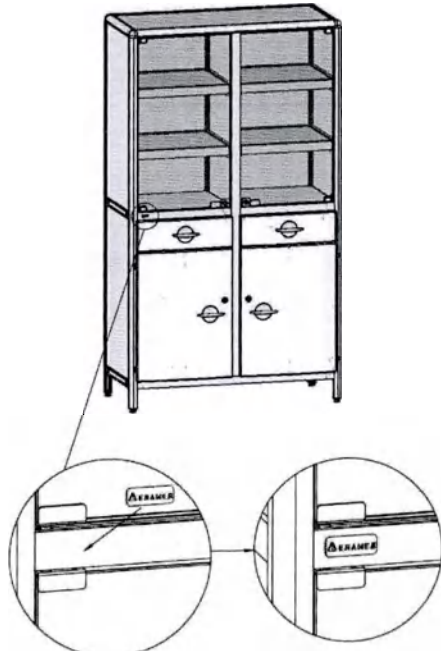

Инструкция по сборке изделия
Шкафы медицинские по ГИКС.942810.107 ТУ
Шкаф медицинский для медикаментов

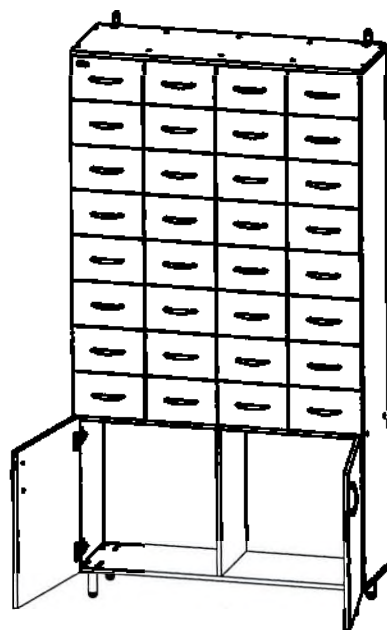

Условные обозначения:

1. А-Т : детали
 2. 1 - 23 : крепёж и фурнитура
 3. 1 - 2 : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Полка межсекционная	1
Д	Крышка	1
Е	Стенка задняя левая	1
Ж	Стенка задняя правая	1
З	Перегородка нижняя	1
И	Стенка задняя выдвижного ящика	32
К	Стенка левая выдвижного ящика	32
Л	Стенка правая выдвижного ящика	32
М	Дно выдвижного ящика	32
Н	Фасад левый выдвижного ящика	8
О	Фасад средний выдвижного ящика	16
П	Фасад правый выдвижного ящика	8
Р	Дверь левая	1
С	Дверь правая	1
Т	Перегородка	3


Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1*	154	Конфирмат	
2	18	Заглушка конфирмата	
3	155	Шкант мебельный	
4	4	Опора	
5	16	Винт М4х25	
6	16	Шайба 4 мм	
7	16	Гайка М4	
8	130	Шток эксцентрика	
9	130	Эксцентрик	
10	120	Заглушка эксцентрика	
11	34 комплекта	Ручка мебельная	
12	58	Гвоздь 1,6х25	
13	2	Уголок	
14	2	Болт М5х25	
15	4	Шайба 5 мм	
16	2	Гайка М5	

3 этап

Произведите сборку трёх перегородок


Перед установкой необходимо каждую направляющую [18] выдвинуть. После установки и затяжки крепежа вернуть в исходное положение.

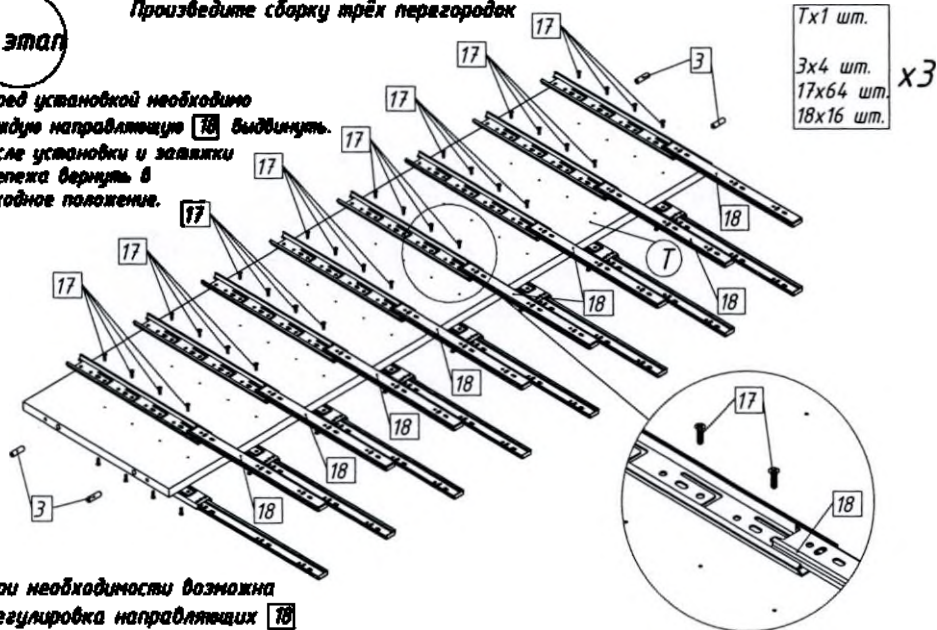

При необходимости возможна регулировка направляющих [18]

4 этап


Произведите установку опор

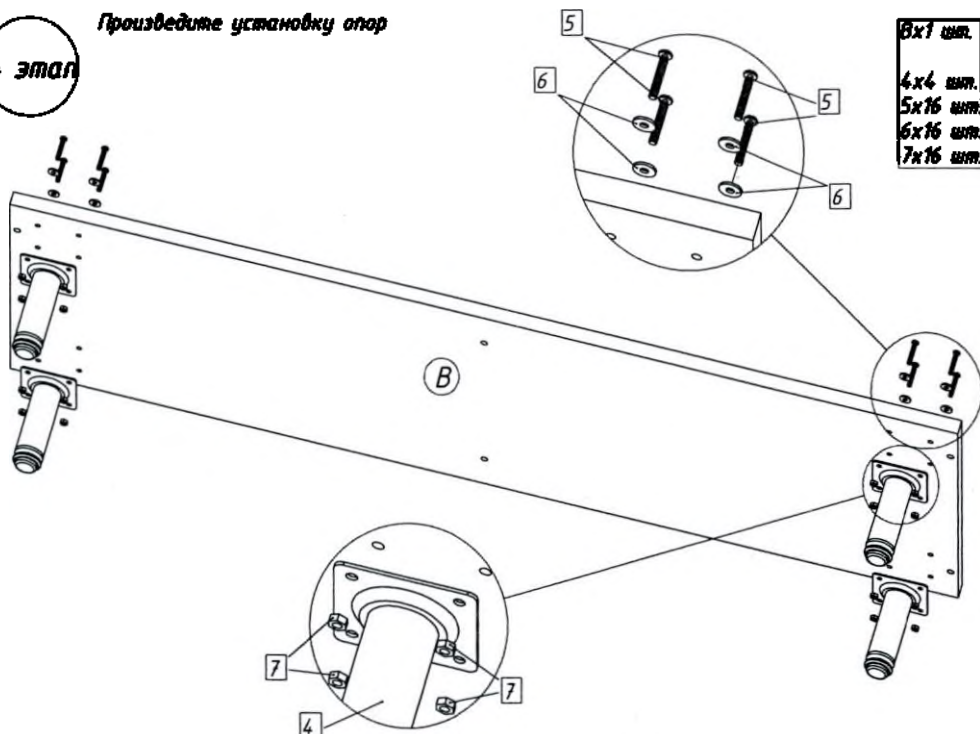

5 этап

Произведите сборку крышки
Установите уголки


Рекомендуется: уголки [13] не притягивать до упора болтами [14]

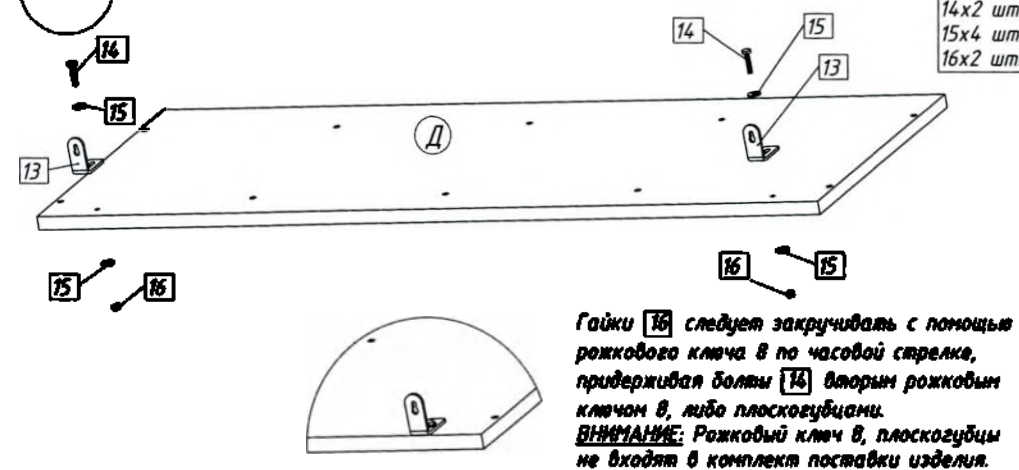

Гайки [16] следует закручивать с помощью рожкового ключа в по часовой стрелки, придерживая болты [14] вторым рожковым ключом в, либо плоскогубцами. ВНИМАНИЕ: Рожковый ключ в, плоскогубцы не входят в комплект поставки изделия.


6 этап

Произведите сборку полки межсекционной и перегородки нижней

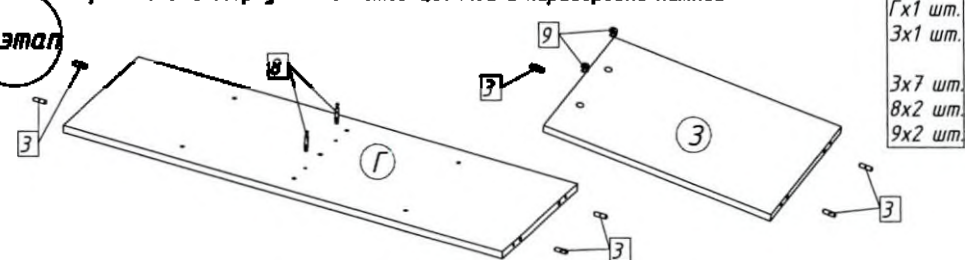

7 этап

Произведите сборку каркаса

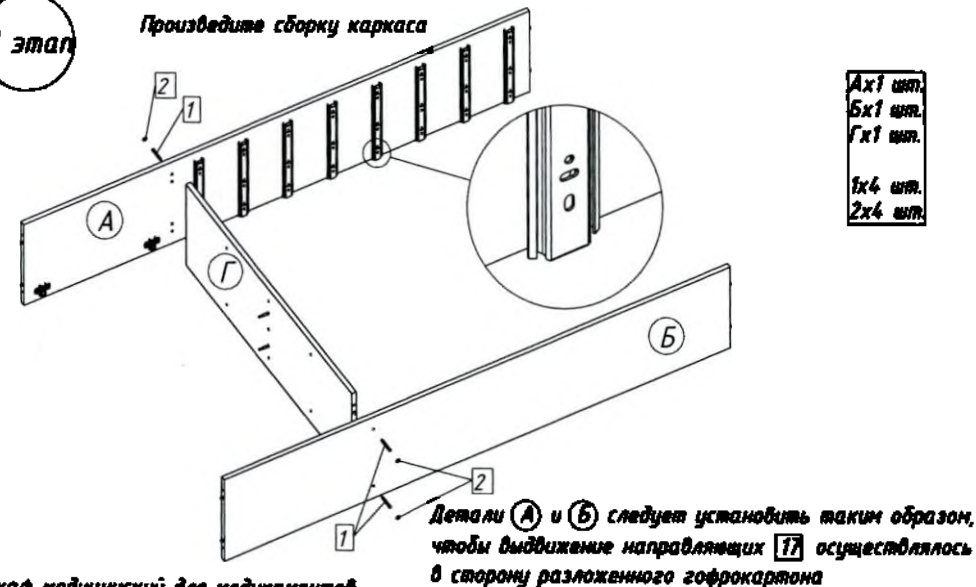


ОМ 29.739.01

8 этап

Произведите сборку перегородок на каркасе


1х3 шт.
1х6 шт.
2х6 шт.

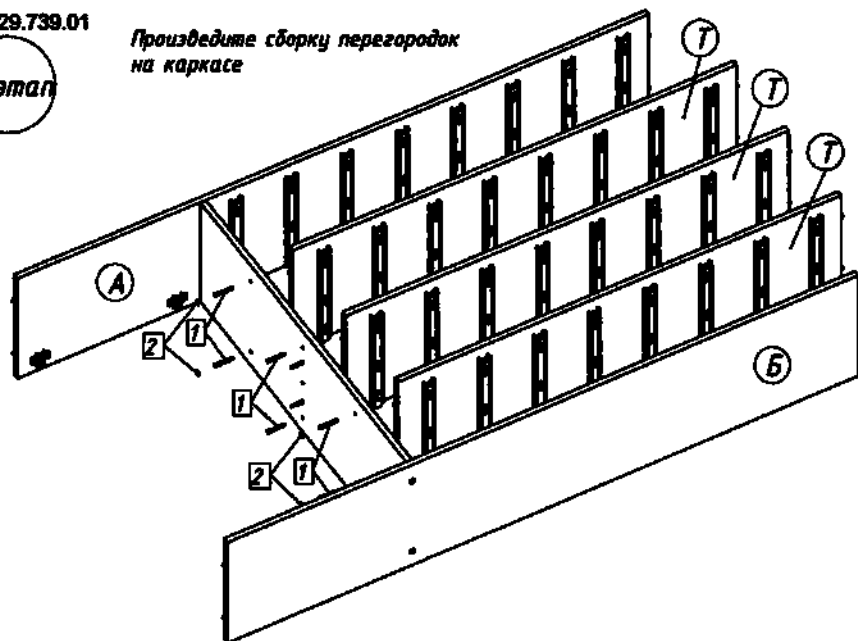

9 этап

Произведите сборку каркаса

Ах1 шт.
Бх1 шт.
Вх1 шт.
Зх1 шт.
1х6 шт.

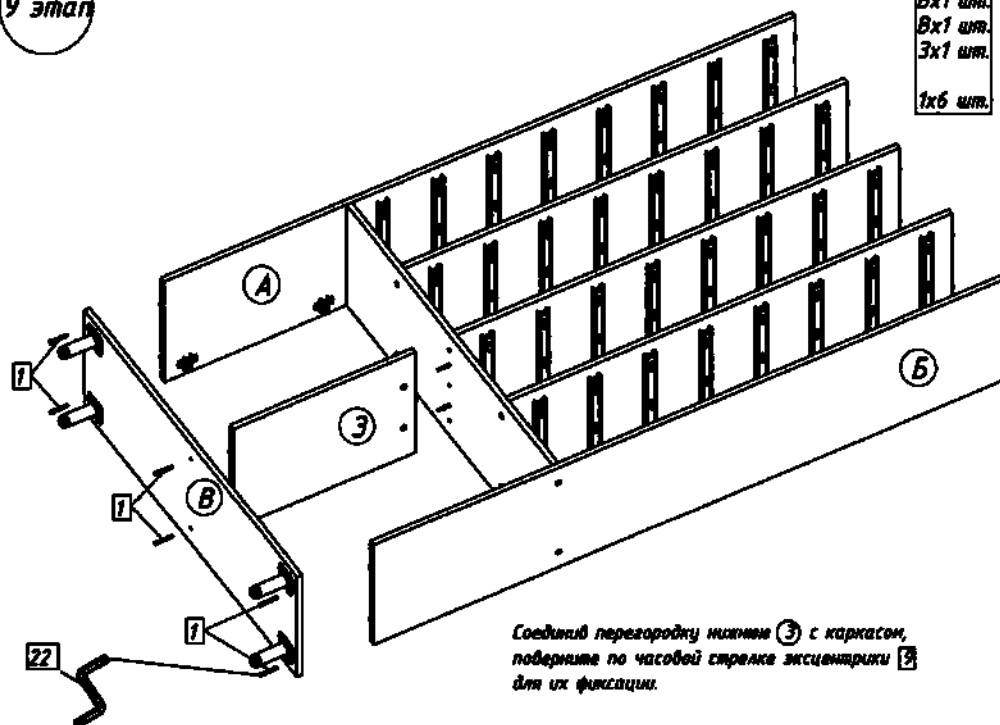


Соедините перегородку нижним 3 с каркасом, поверните по часовой стрелке эксцентрики 2 для их фиксации.

ОМ 29.739.01

10 этап

Произведите установку крышки

Дх1 шт.
1х10 шт.
2х10 шт.

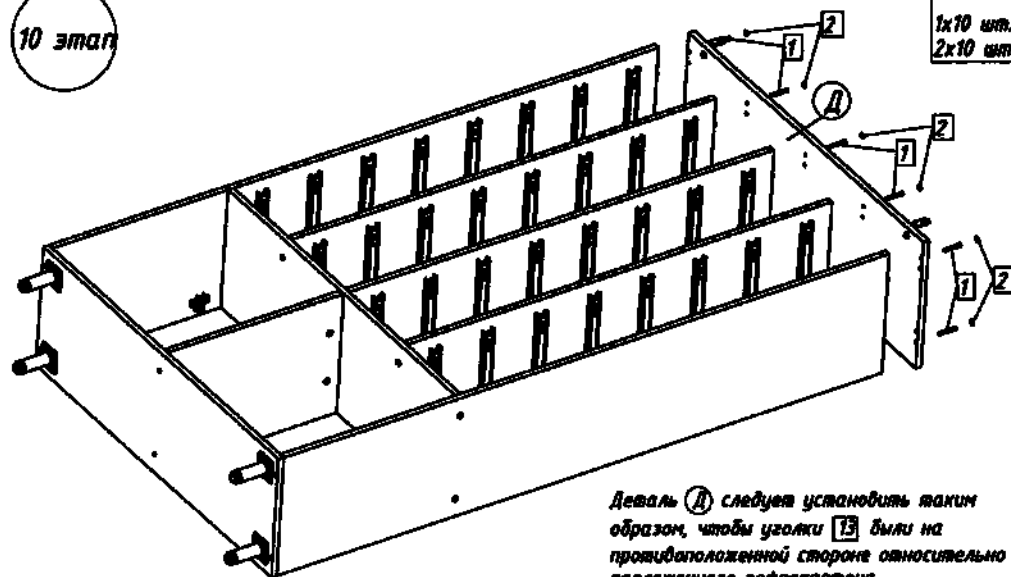


Деталь Д следует установить таким образом, чтобы уголки 13 были на противоположной стороне относительно разложенного гофрокартона.

11 этап

Произведите установку стенок задних


Ех1 шт.
Жх1 шт.

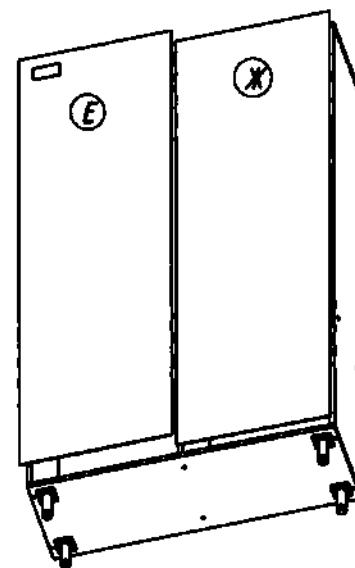

12 этап

Произведите крепёж стенки задней гвоздями с шагом 100-150мм и отступом от края на 8мм


12х50 шт.
21х16 шт.

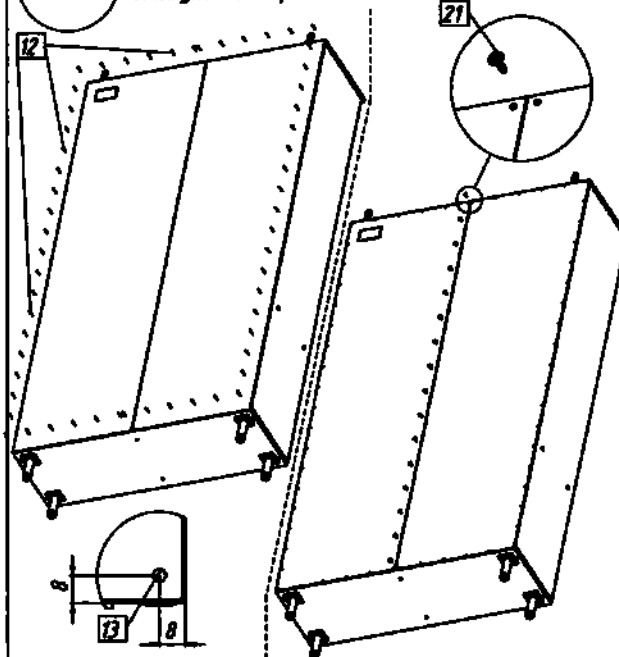



После фиксации задних стенок Е и Ж установите изделие в вертикальное положение.

13 этап

Схема расположения
гвоздей и саморезов

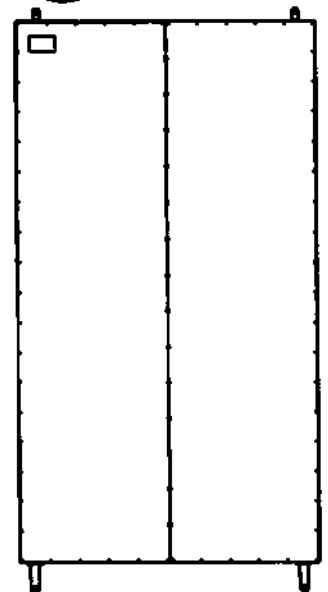


После того, как изделие будет
закреплено к стене, гайки 16
следует затянуть до ощутимого
сопротивления

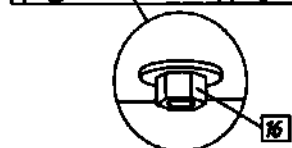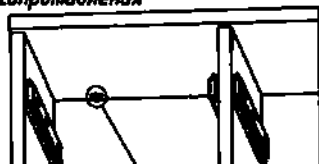

0x1 шт.
8x4 шт.
11/1x1 шт.
11/2x2 шт. x16


14 этап

Произведите установку изделия
Установите изделие вертикально
и отрегулируйте опоры

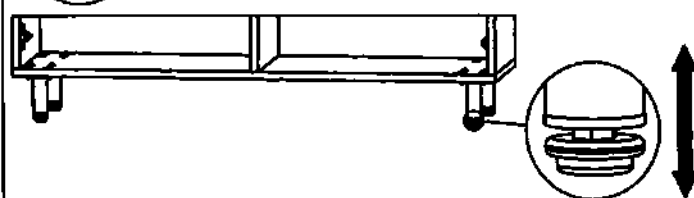

Внимание: дальнейшая регулировка опор будет невозможна!

После регулировки опор изделия необходимо зафиксировать к
стене винтами. Для этого предусмотрены специальные уголки
с функцией регулировки положения относительно стены



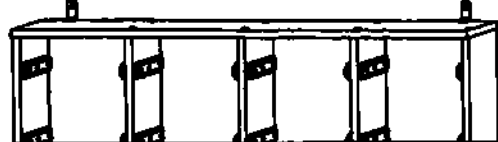


ВНИМАНИЕ: Дополнительная фурнитура
для крепления изделия к стене не входит
в комплект поставки изделия.

15 этап

Произведите сборку 8-ми фасадов левых,
16-ти фасадов средних и 8-ми фасадов
правых выдвижных ящиков

11x1 шт.
8x4 шт.
11/1x1 шт.
11/2x2 шт. x8









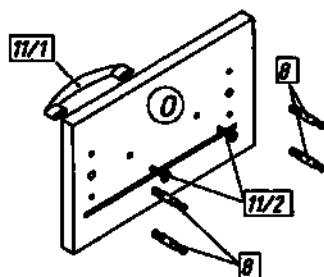
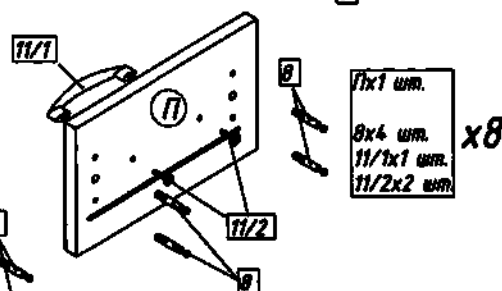
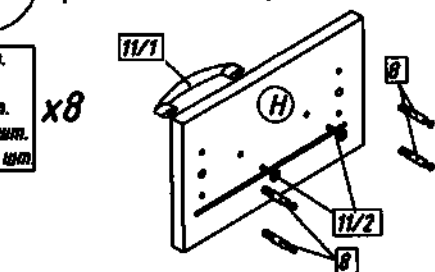


Произведите сборку деталей для каркасов выдвижных ящиков


Соберите каждые стенки И, К, Л в 32-х экземплярах!

16 этап

11x1 шт.
8x4 шт.
11/1x1 шт.
11/2x2 шт. x32

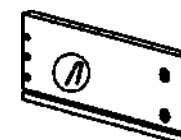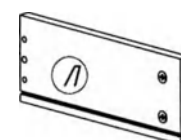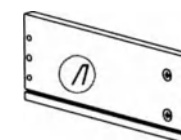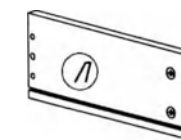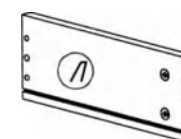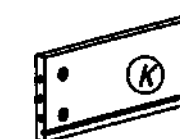
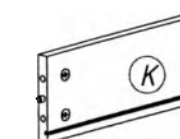
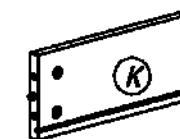
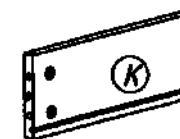
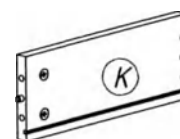
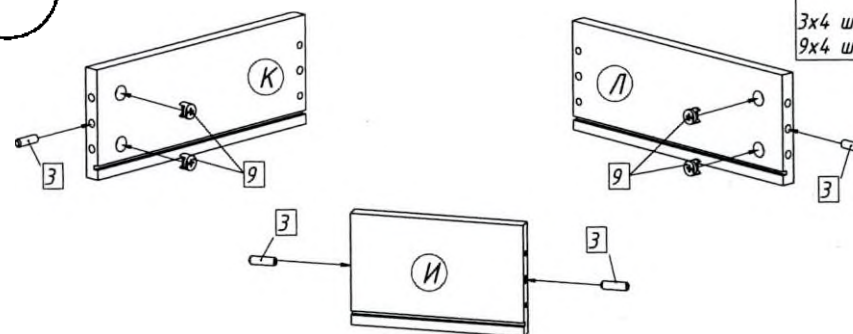


17 этап

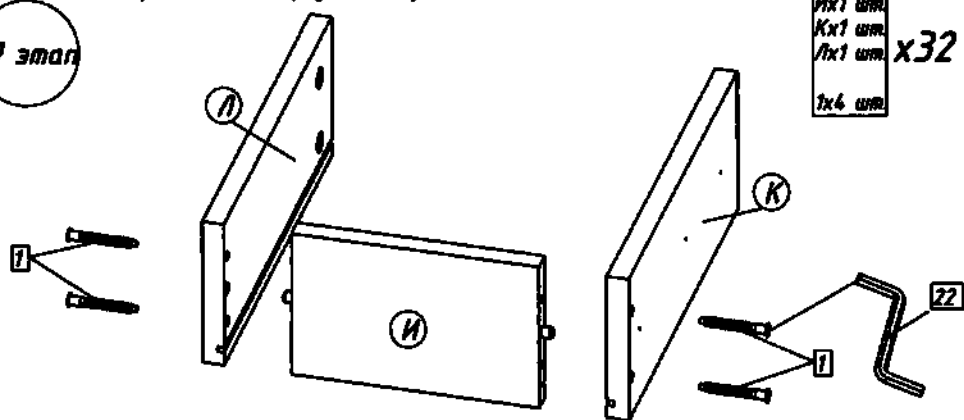

18 этап

Произведите установку дна для 32-х каркасов выдвижных ящиков

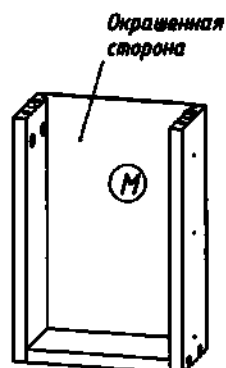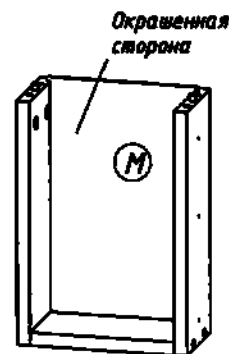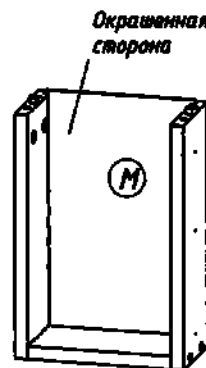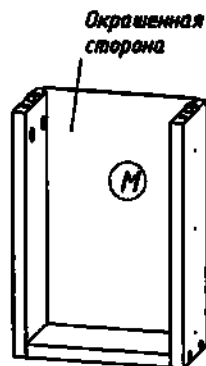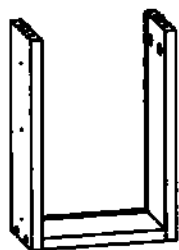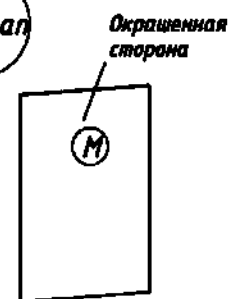

Произведите установку 8-ми фасадов левых выдвижных ящиков












19 этап

Схема фиксации фасада (H) и установки заглушек (10)

1x1 шт.
10x4 шт. x8




Соединив фасад (H) с каркасом ящика, поверните по часовой стрелке эксцентрики (9) для их фиксации. Затем установите заглушки (10)

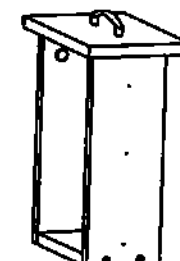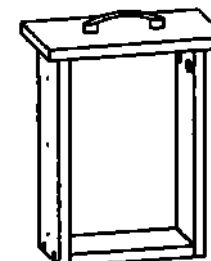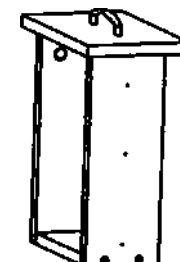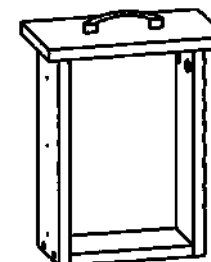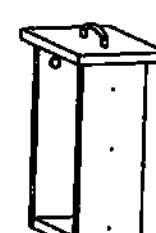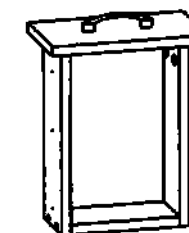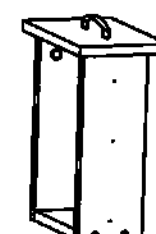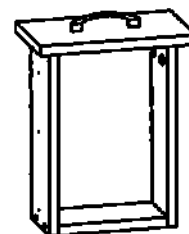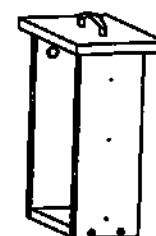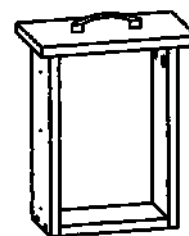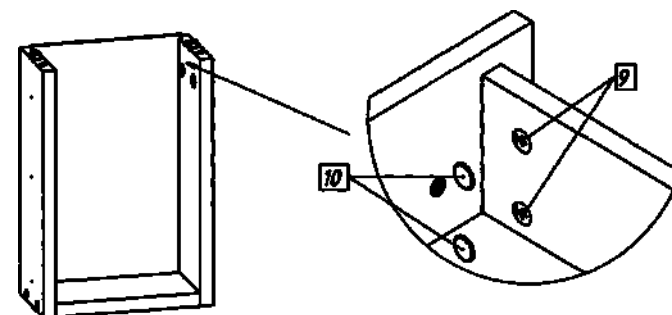

ОМ 29.739.01 Произведите установку 16-ти фасадов средних выдвижных ящиков

20 этап


Схема фиксации фасада ① и установки заглушек ⑩

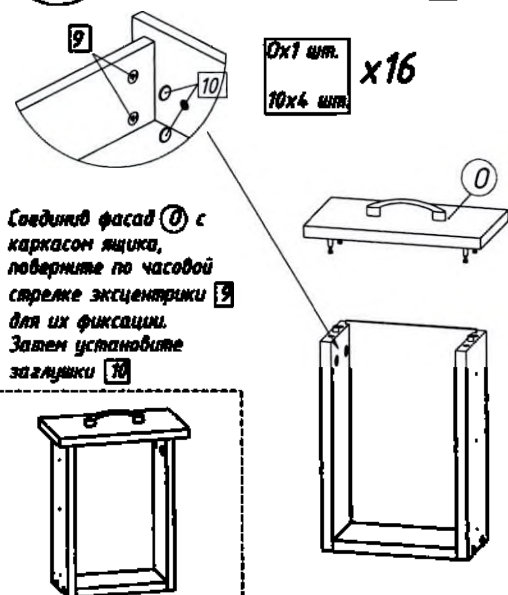

21 этап

Произведите установку 8-ми фасадов правых выдвижных ящиков



Схема фиксации фасада ① и установки заглушек ⑩

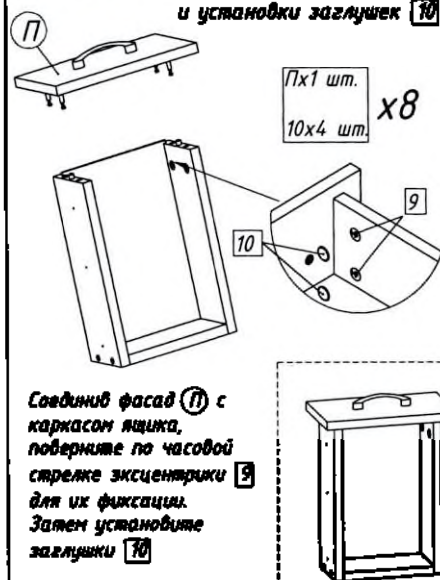

ОМ 29.739.01

Произведите установку направляющих на 32 выдвижных ящика

23 этап

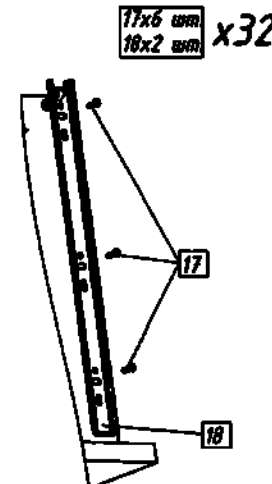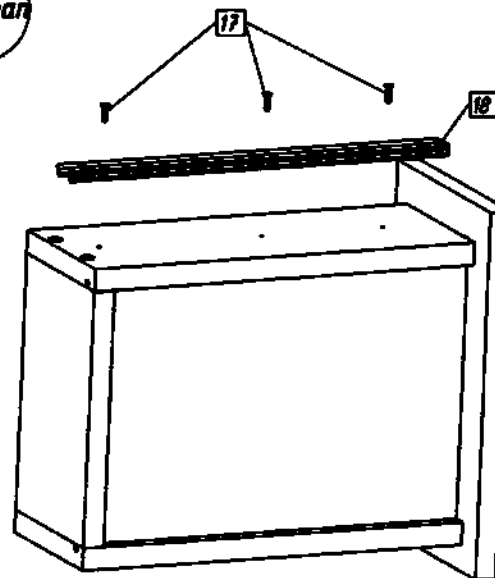


22 этап


Произведите разъединение направляющих

ВНИМАНИЕ: Убедитесь в надёжности крепления изделия к стене. В противном случае дальнейшая сборка и эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНА!



Рекомендуется разъединять направляющие ⑩ по одному комплекту, устанавливая их сразу на собранные ящики (см. Этап 23)

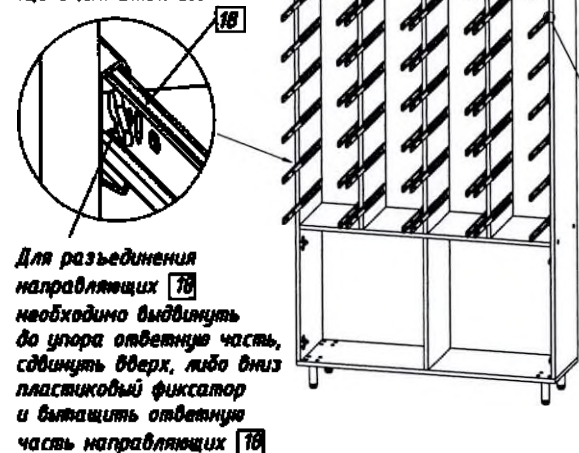


Для разъединения направляющих ⑩ необходимо выдвинуть до упора ответную часть, сдвинуть вверх, либо вниз пластиковый фиксатор и вытянуть ответную часть направляющих ⑩

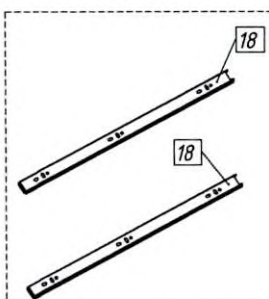


Для разъединения направляющих ⑩ необходимо выдвинуть до упора ответную часть, сдвинуть вверх, либо вниз пластиковый фиксатор и вытянуть ответную часть направляющих ⑩

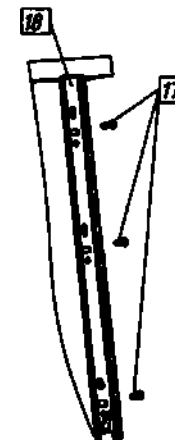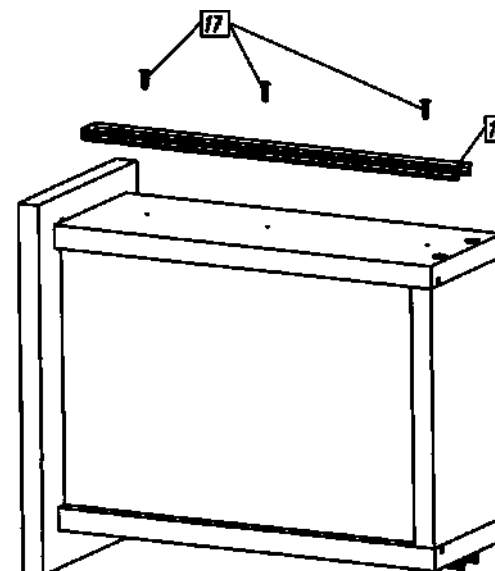


ОМ 29.739.01 Произведите сборку дверей нижних левой и правой

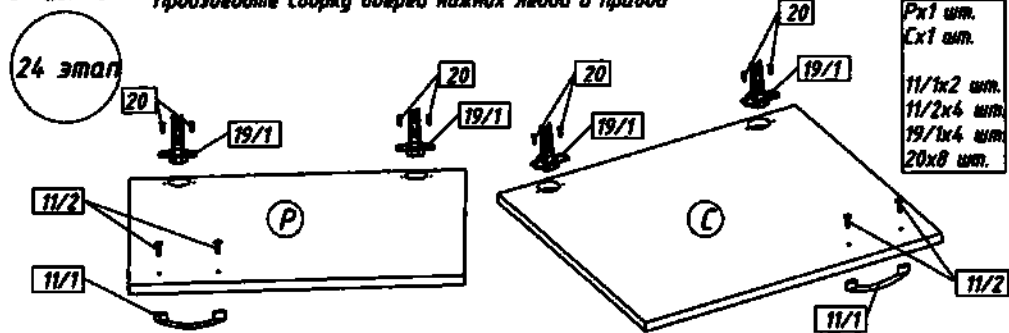

Произведите установку дверей нижних

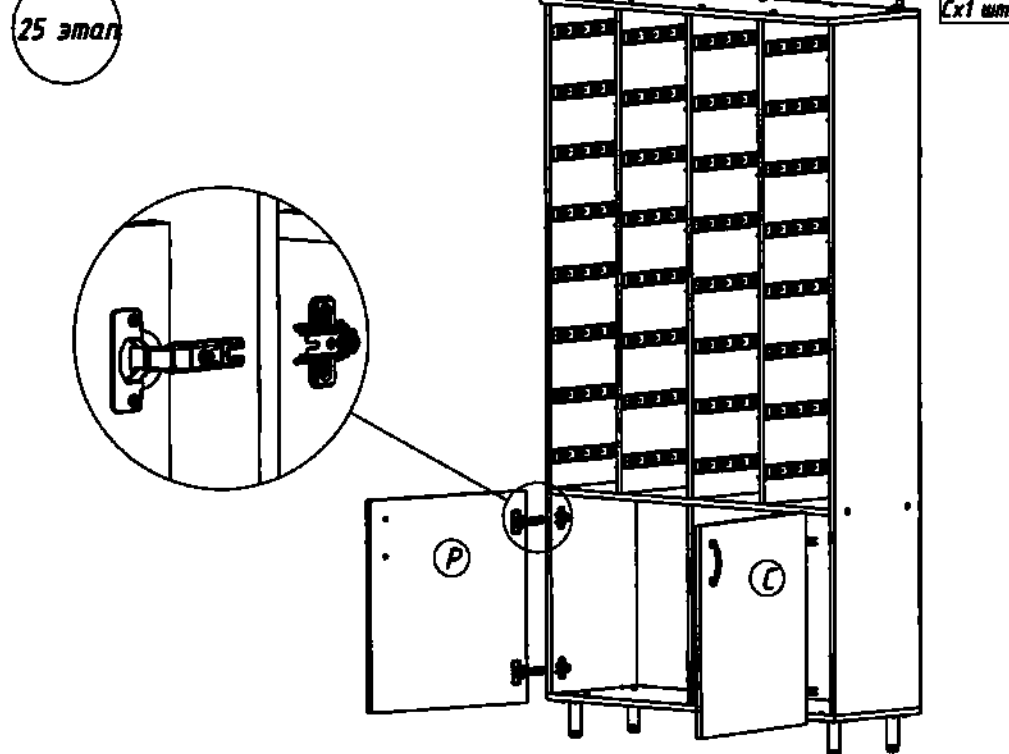


После установки двери, произведите регулировку петель, с затяжкой всех винтов и саморезов

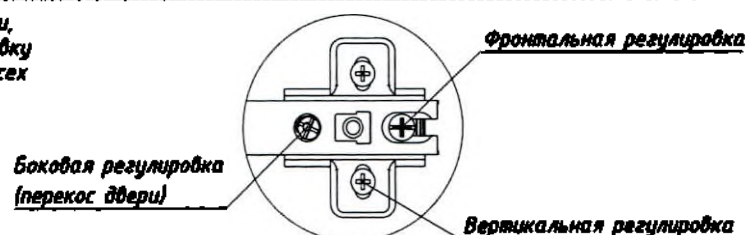


ОМ 29.739.01

Произведите установку ящиков

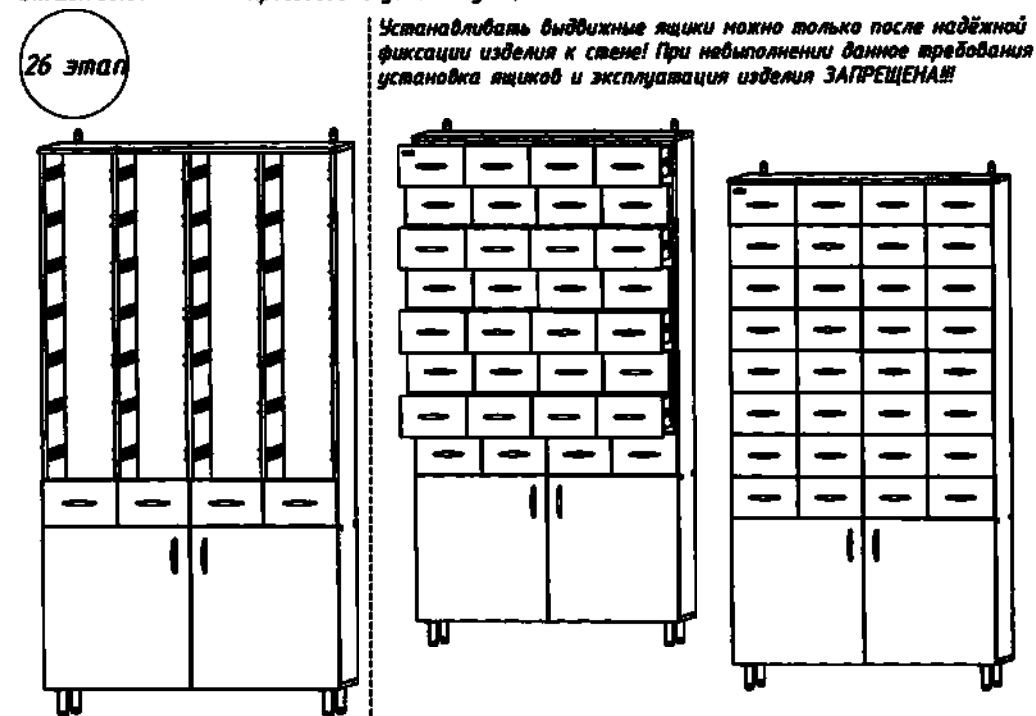


27 этап После сборки изделия наклейте самоклеющийся логотип компании 23

23x1 шт.

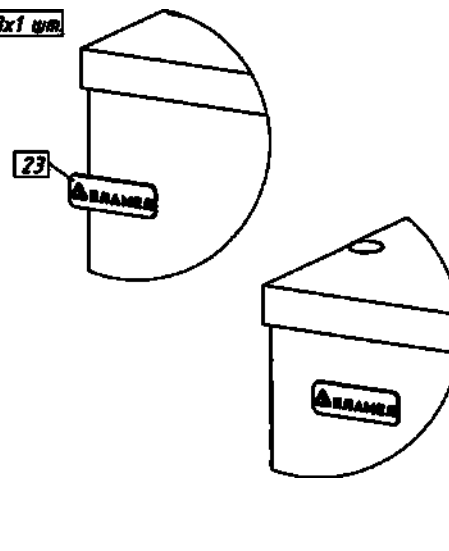

Инструкция по сборке изделия
Шкафы медицинские по ГИКС.942810.107 ТУ
Шкаф медицинский навесной для фармпрепаратов

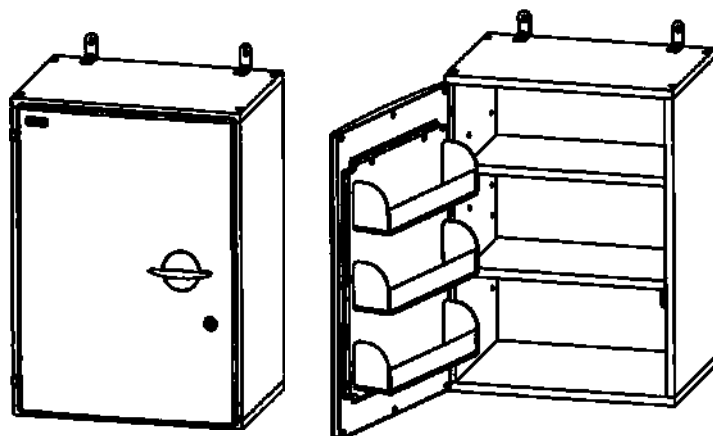

Условные обозначения:

1. А-К : детали

2. 1 - 20 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 15 : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол - во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Крышка	1
Д	Стенка задняя	1
Е	Полка	2
Ж	Дверь	1
З	Основание навесных полок	1
И	Полка навесная	3
К	Планка навесной полки	3

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1*	8	Конфирмат	
2	8	Заглушка конфирмата	
3	4	Шкант мебельный	
4	2	Уголок	
5	2	Болт М5х25	
6	4	Шайба 5 мм	
7	2	Гайка М5	
8	8	Полкодержатель	
9	16	Заглушка технол. отверстий	
10	1	Ручка мебельная	
11	2	Винт М4х25	
12	20	Гвоздь 1,6х25	
13	1	Ответная планка замка	
14	2	Саморез 3х12	
15	2	Петля обертная	
16	2	Штифт петли	

Арт.	Кол - во	Обозначение	
17	2	Саморез с прессшайбой 4,2x19	
18	4	Саморез с прессшайбой 4,2x25	
19*	1	Ключ шестигранный 6мм	
20	1	Логотип компании	


Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

* Конфирматы 17 закручивать ключом шестигранником 19 заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

1 этап

Произведите сборку стенки левой

Рекомендации для сборки:
разложите на твёрдой поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборку деталей и изделия!

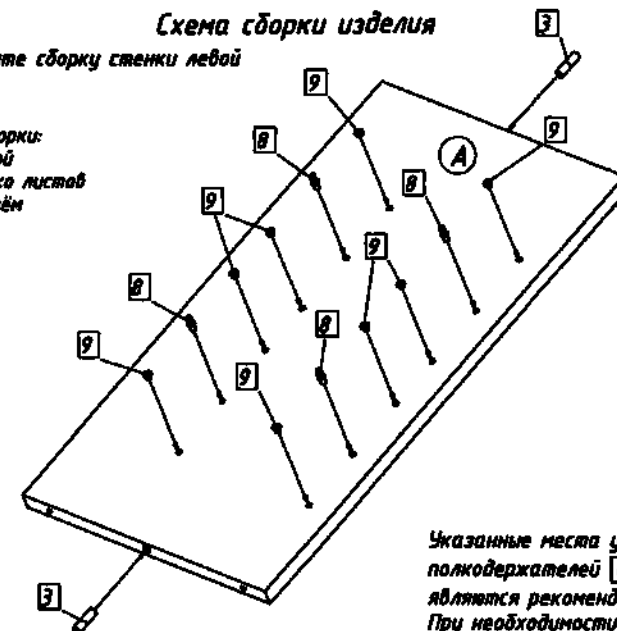


4x1 шт.
3x2 шт.
8x4 шт.
9x8 шт.

Указанные места установки полкодержателей 8 являются рекомендуемыми. При необходимости можно установить в другие отверстия, предварительно извлечь заглушки 9.

При необходимости полкодержатели 8, следует забивать легкими ударами молотка

2 этап

Произведите сборку стенки правой

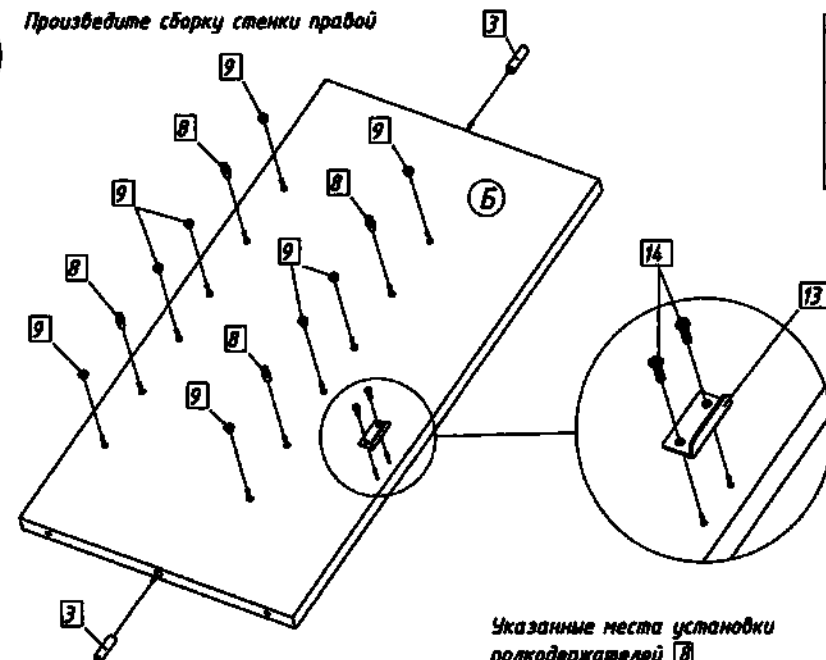

5x1 шт.
3x2 шт.
8x4 шт.
9x8 шт.
13x1 шт.
14x2 шт.


Указанные места установки полкодержателей 8 являются рекомендуемыми. При необходимости можно установить в другие отверстия, предварительно извлечь заглушки 9.

При необходимости полкодержатели 8, следует забивать легкими ударами молотка

Шкаф медицинский навесной для фармпрепаратов

OM 29.481.01 Произведите сборку крышки

3 этап

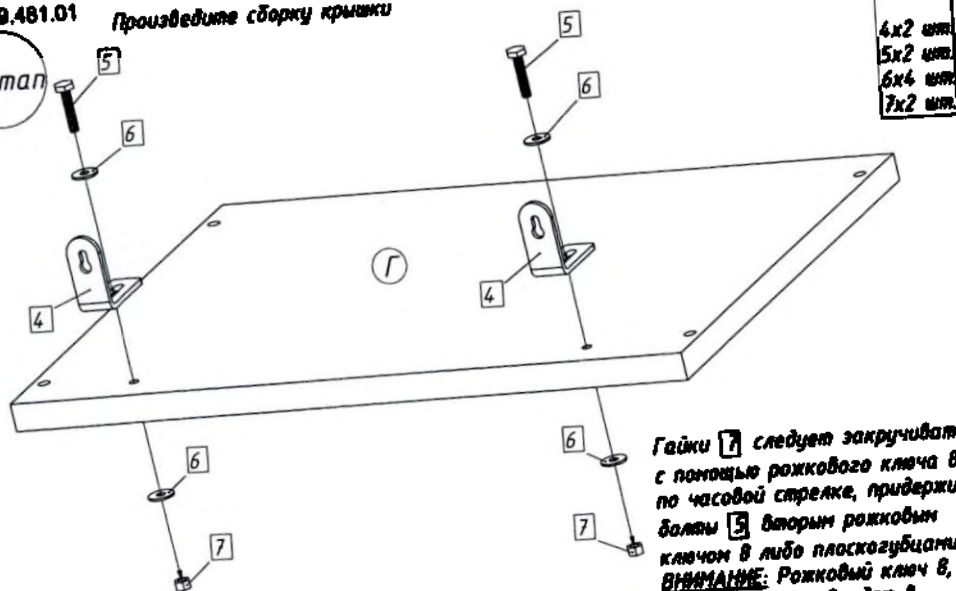


Гх1 шт.
4х2 шт.
5х2 шт.
6х4 шт.
7х2 шт.

Рекомендуется: уголки [4] не притягивать до упора болтами [5]

Гайки [7] следует закручивать с помощью рожкового ключа в по часовой стрелке, придерживая болты [5] вторым рожковым ключом в левую плоскогубцами
ВНИМАНИЕ: Рожковый ключ в, плоскогубцы не входят в комплект поставки изделия

Произведите сборку двери
Установите ручку

4 этап

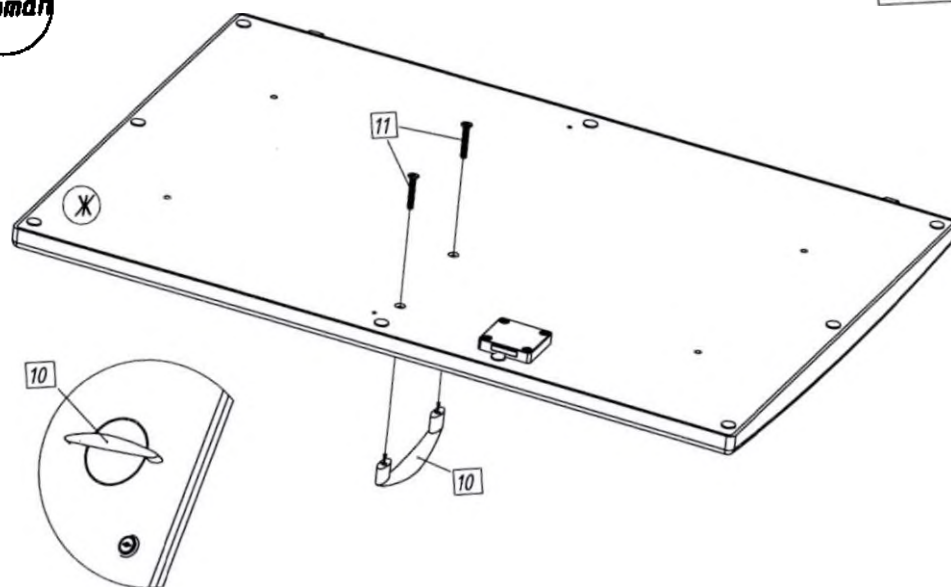

Жх1 шт.
10х1 шт.
11х2 шт.


Рекомендуется: ручку [10] затянуть до упора винтами [11]

Шкаф медицинский навесной для фармпрепаратов

OM 29.481.01 Произведите сборку двери


Установите основание навесных полок

5 этап

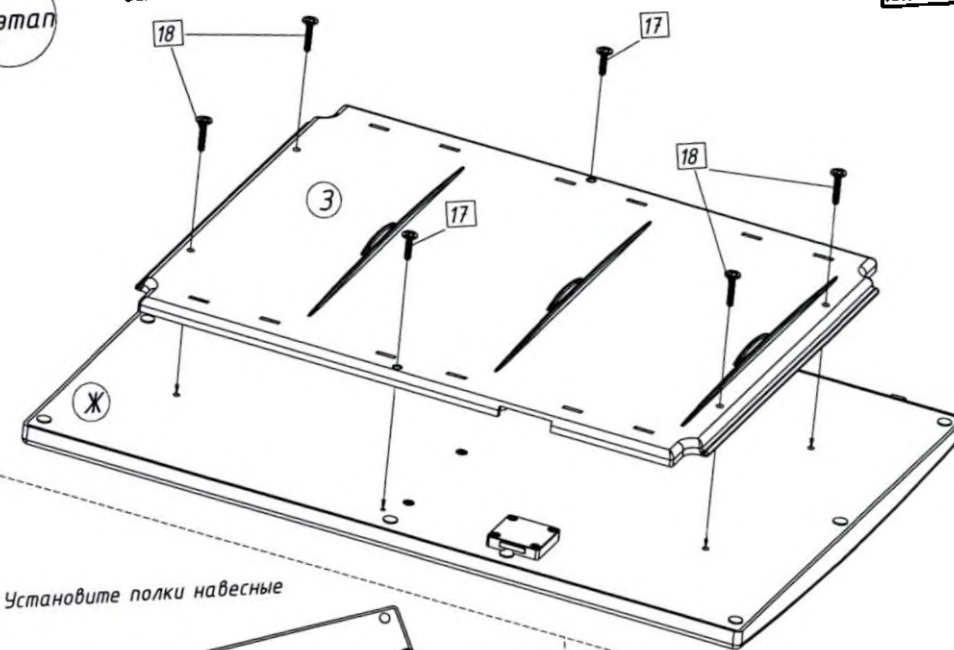


3х1 шт.
17х2 шт.
18х4 шт.


Установите полки навесные

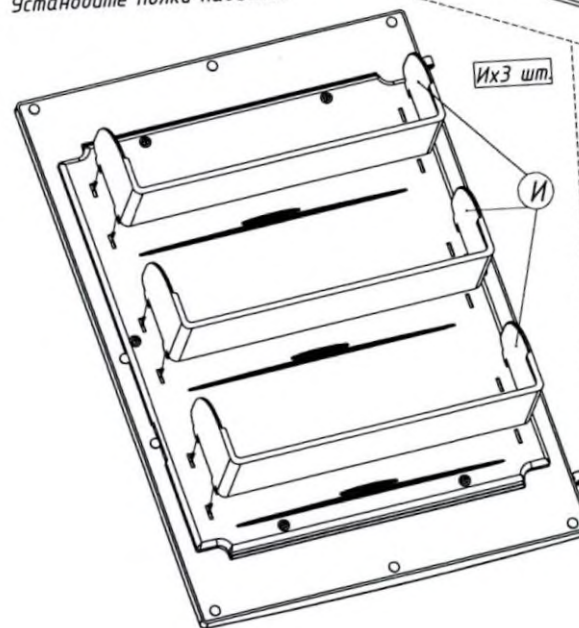

Их3 шт.

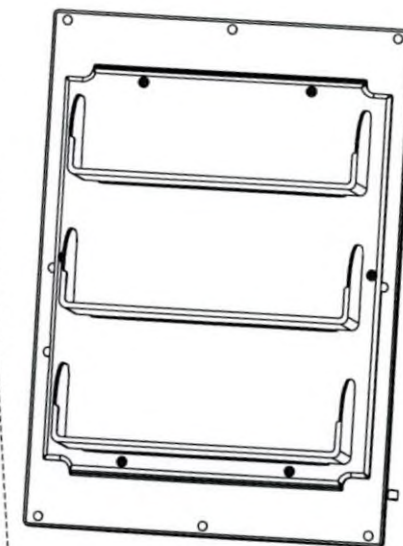


6 этап

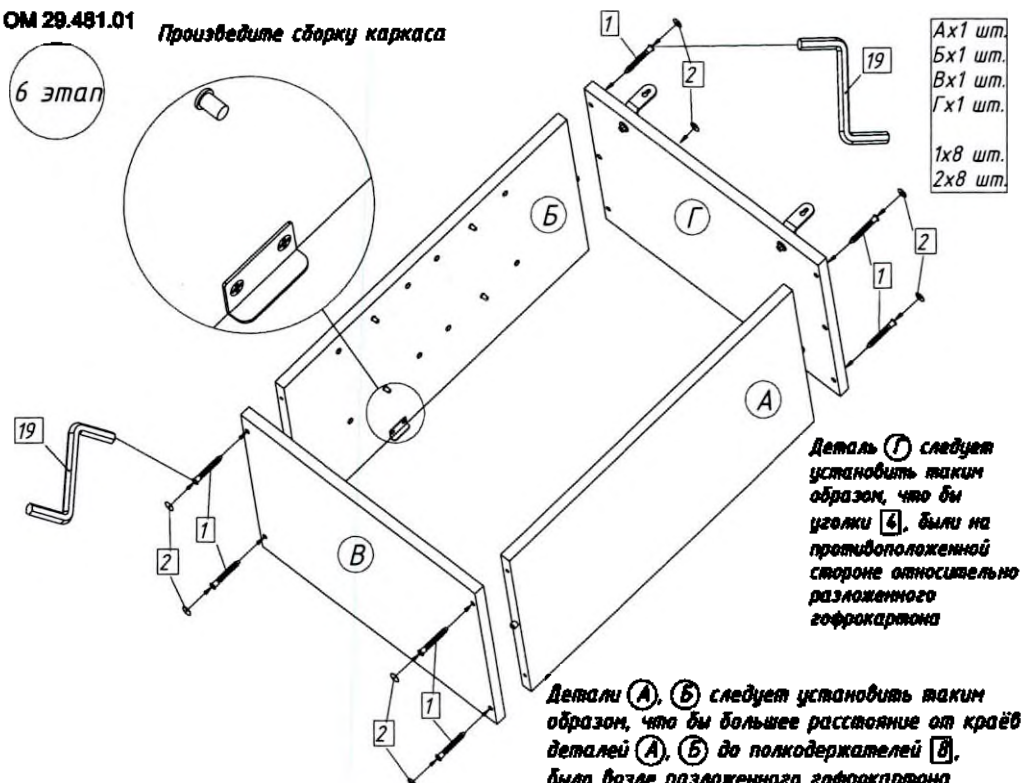

7 этап

Произведите установку стенки задней


Дх1 шт.

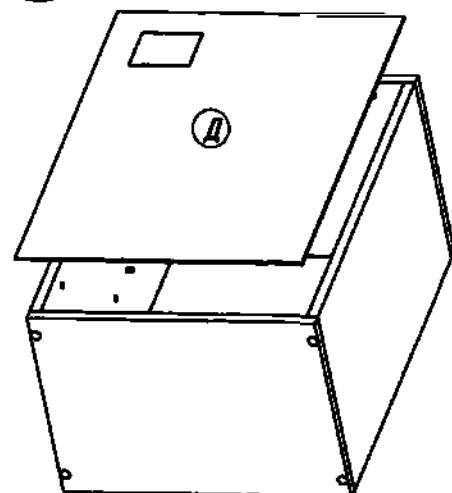


8 этап

Произведите крепёж стенки задней гвоздями, с шагом 100-150мм и отступом от края на 8мм

12x20 шт.

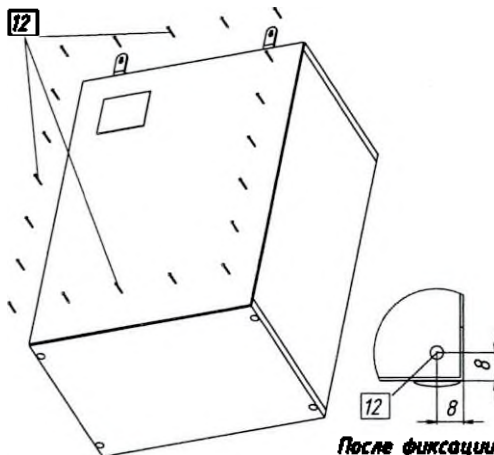


9 этап

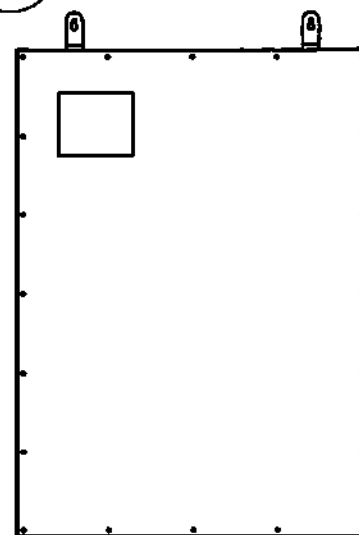

10 этап


Произведите установку петель ввёртных

15x2 шт.

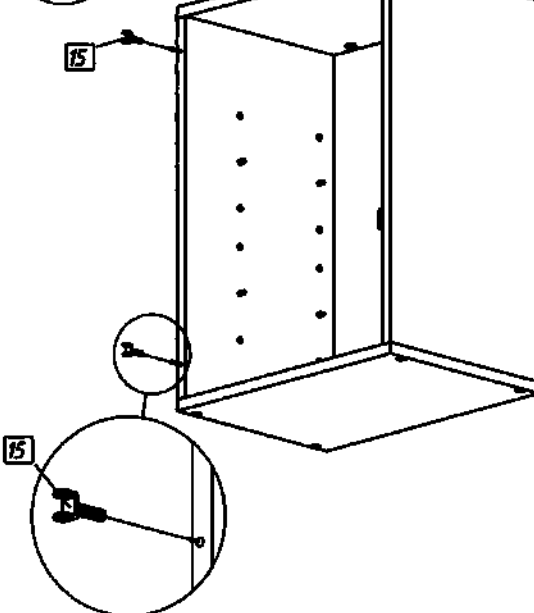

11 этап

Установленные петли ввёртные

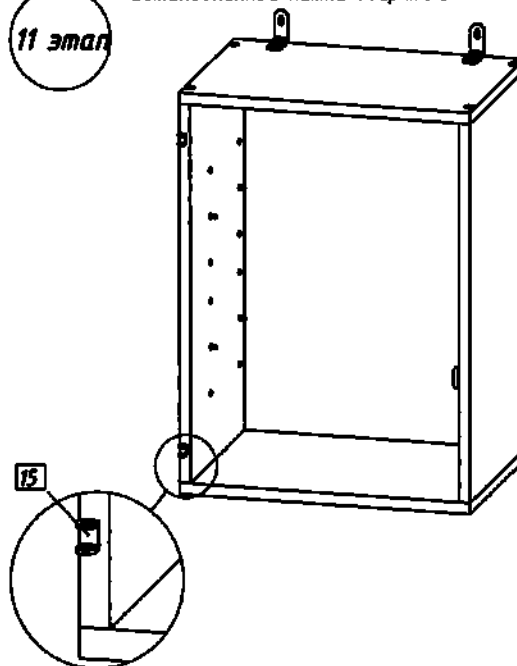


Шкаф медицинский настенный для фармпрепаратов

12 этап

Произведите установку 2-х полок

Ех2 шт.

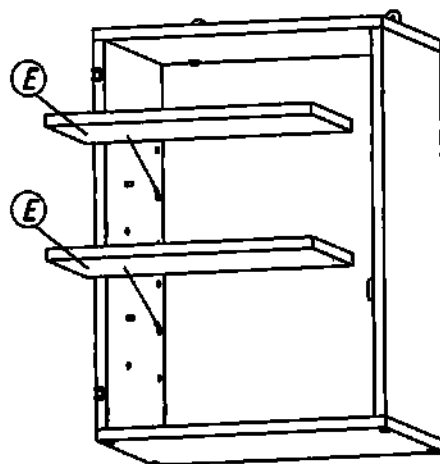


Имеется возможность регулировки полки Е по высоте выше либо ниже, путём перестановки полкодержателей

ОМ 29.481.01

Установленные полки



13 этап

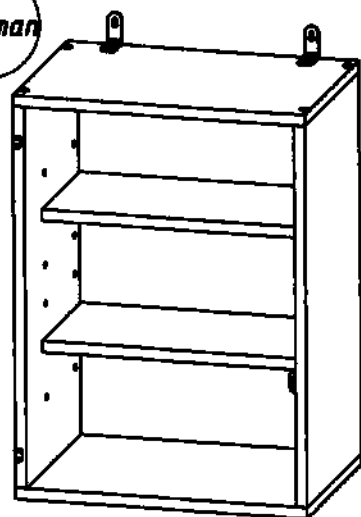

14 этап





Произведите установку двери

Жх1 шт.
16х2 шт.

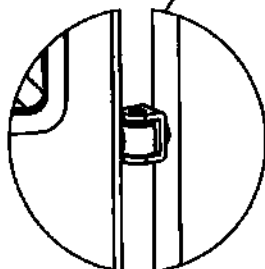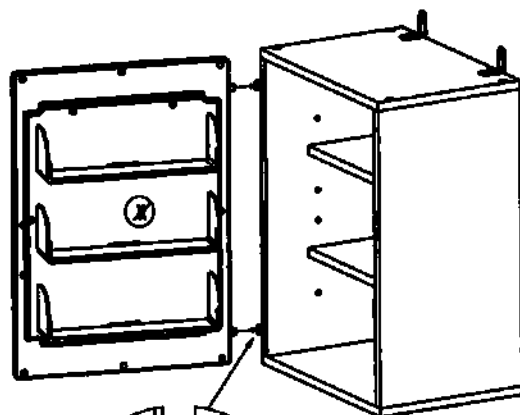

Штифты петель 16,
забивать легкими
ударами молотка

Наклейте самоклеющийся
логотип компании 20

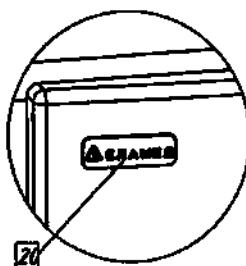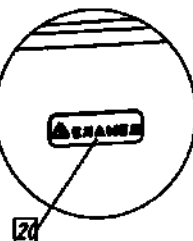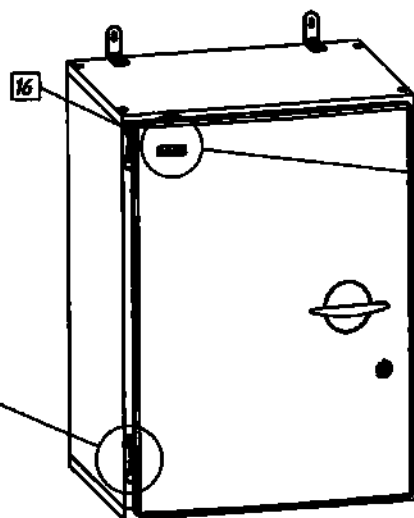
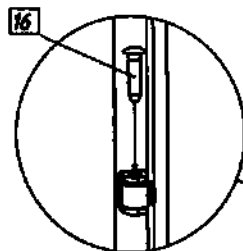


ОМ 29.481.01

Произведите установку планок
навесных полок


Жх3 шт.

15 этап

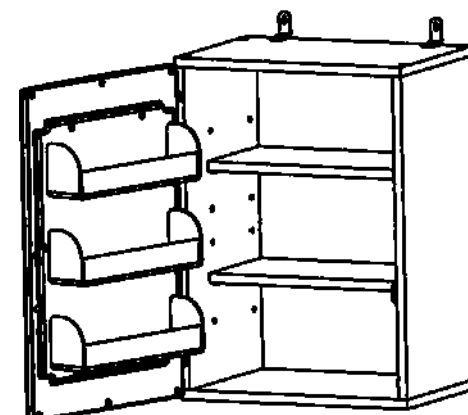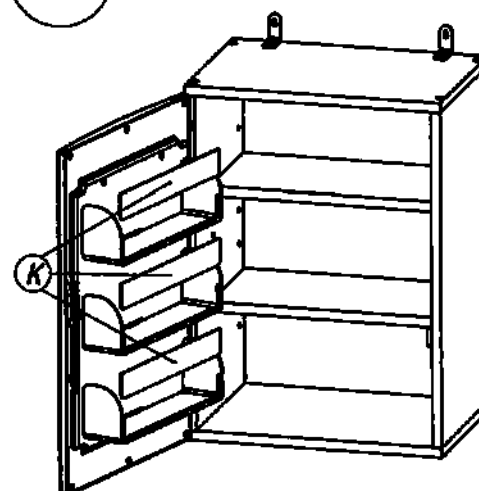


Произведите установку изделия

Перед началом эксплуатации изделие необходимо
закрепить к стене винтами, для этого предусмотрены
специальные уголки с функцией регулировки положения
относительно стены

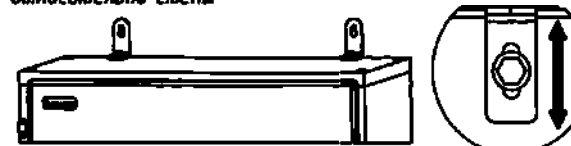


ВНИМАНИЕ: Дополнительная фурнитура для крепления
изделия к стене не входит в комплект
поставки изделия


После того как изделие будет закреплено к стене,
гайки 7 следует затянуть до ощутимого сопротивления

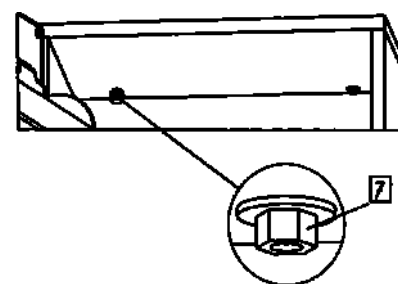

Сборка изделия завершена

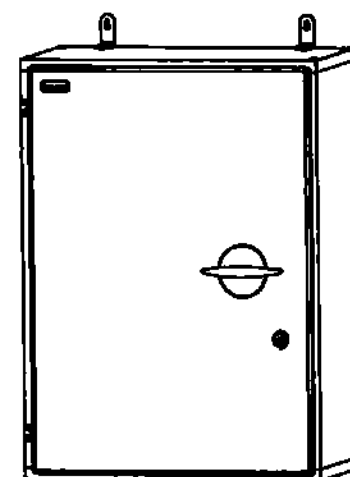

Инструкция по сборке изделия
Шкафы медицинские по ГИКС.942810.107 ТУ
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.1)

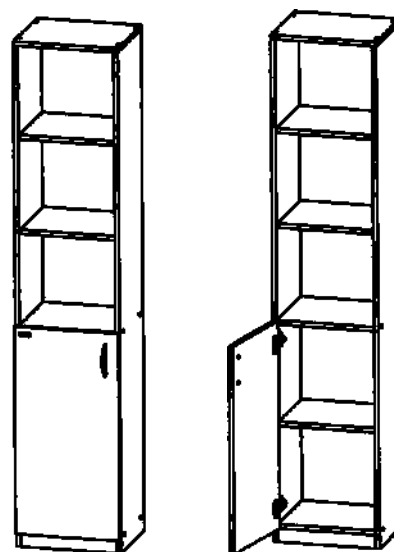

Условные обозначения:

1. А-И : детали
 2. 1 - 11 : крепёж и фурнитура
 3. 1 - 12 : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Полка межсекционная	1
Д	Крышка	1
Е	Царга	1
Ж	Полка	3
З	Стенка задняя	1
И	Дверь	1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1*	14	Конфирмат	
2	14	Заглушка конфирмата	
3	12	Шкант мебельный	
4	12	Полкодержатель	
5	4	Подпятник мебельный	
6	1	Ловотип компании	
7	2 комплекта	Петля накладная, монтажная планка	7/1 7/2
8	8	Саморез 4x16	
9	57	Гвоздь 1,6x25	
10	1 комплект	Ручка мебельная, винты с прессшайбой	10/1 10/2
11*	1	Ключ шестигранный	


* Конфирматы 1* закручивать ключом шестигранным 11* заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

Схема сборки изделия


1 этап

Произведите сборку стенки правой.
Рекомендации по сборке: разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона и на них производите сборку изделия.

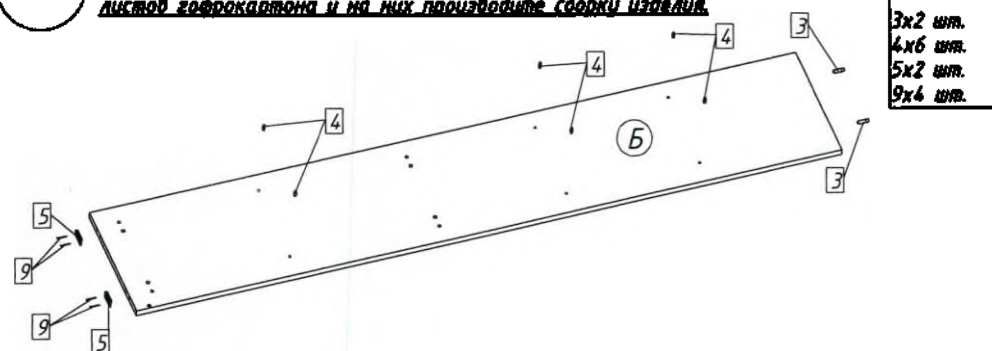


2 этап

Произведите сборку основания и полки межсекционной

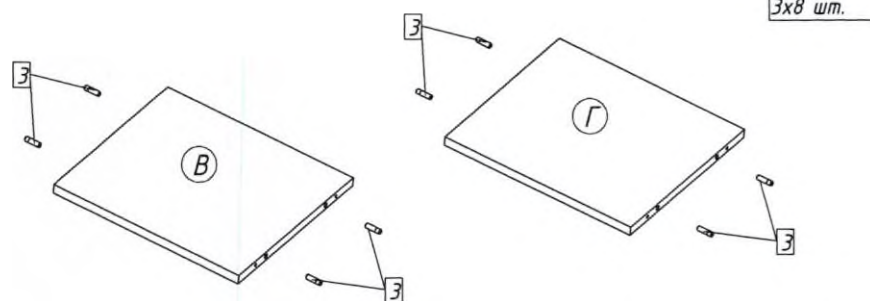


3 этап

Соедините между собой стенку правую, царгу, основание и полку межсекционную

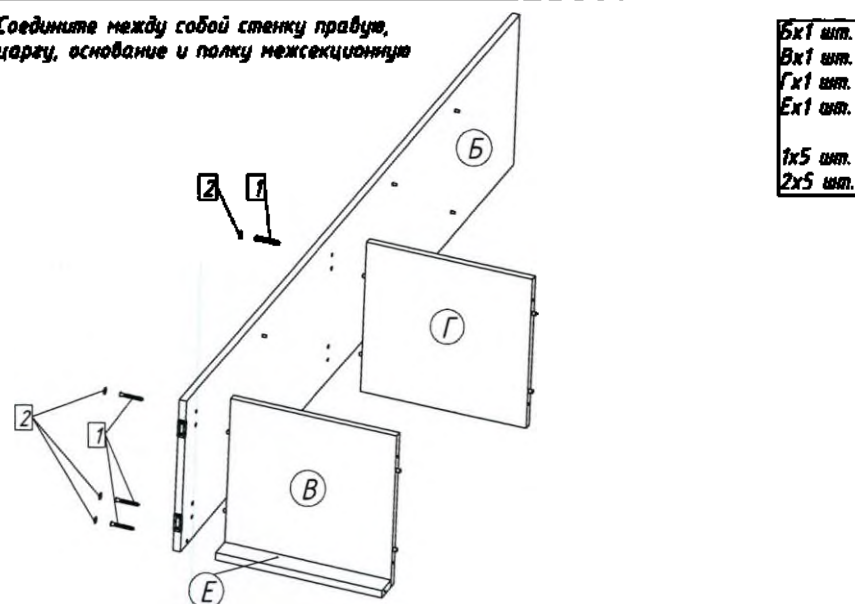


4 этап

Произведите сборку стенки левой

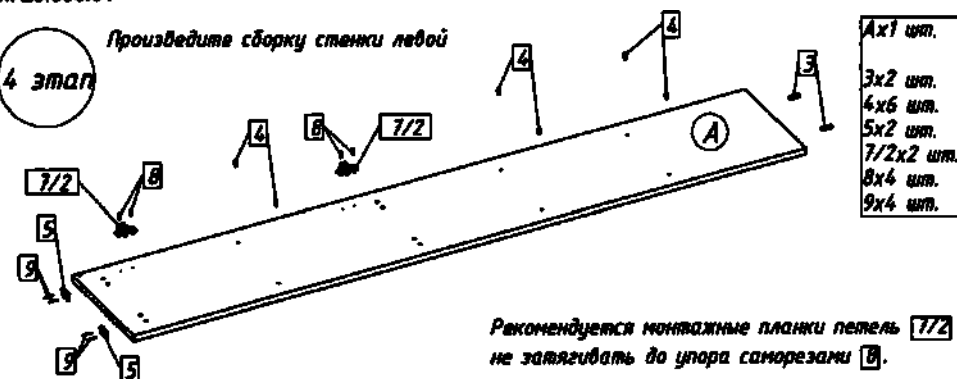


5 этап

Произведите установку стенки левой

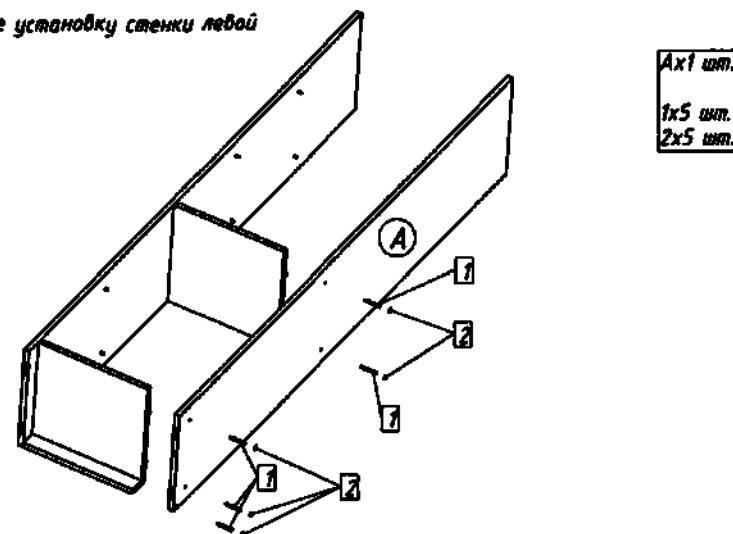


6 этап

Произведите установку крышки

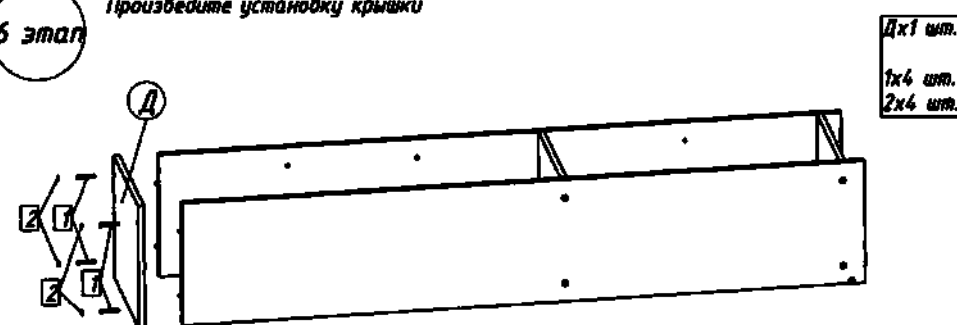


7 этап

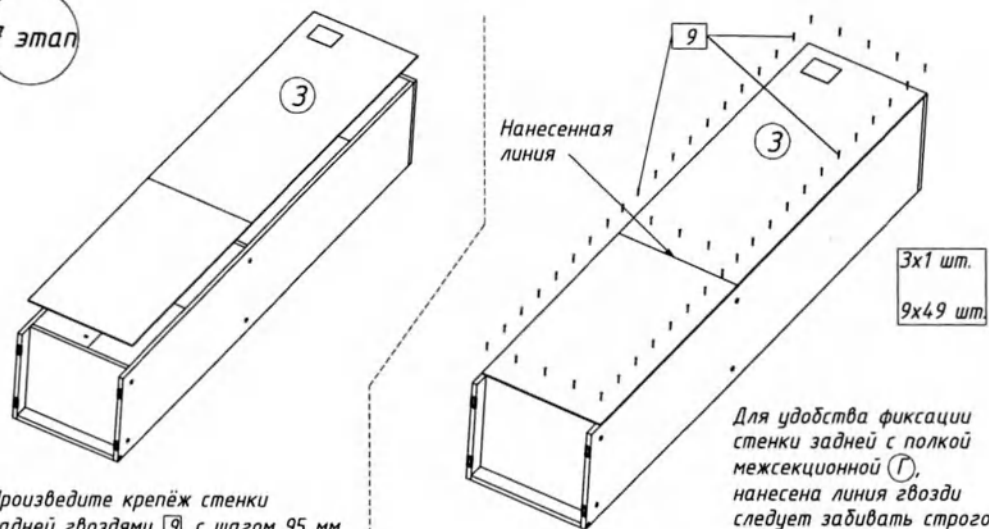

Произведите крепёж стенки задней гвоздями [9] с шагом 95 мм и отступом от края на 8 мм.

8 этап

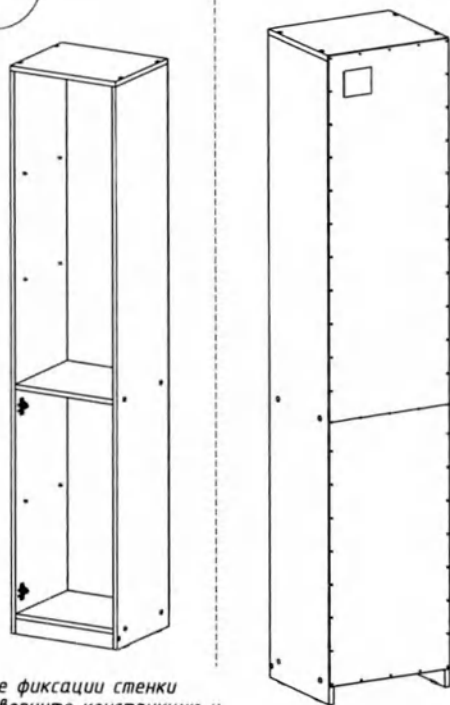


После фиксации стенки переверните конструкцию и поставьте её на ножки.


9 этап

Произведите установку полок

Жх3 шт.

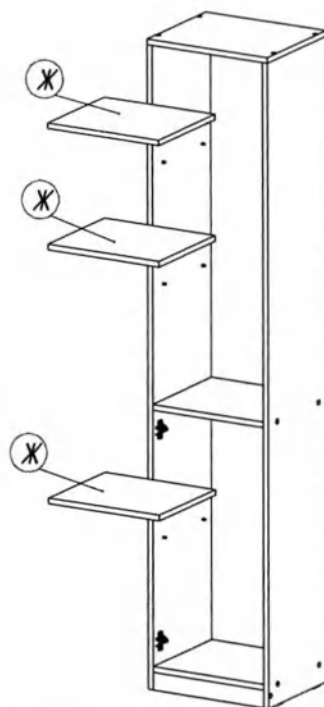

10 этап

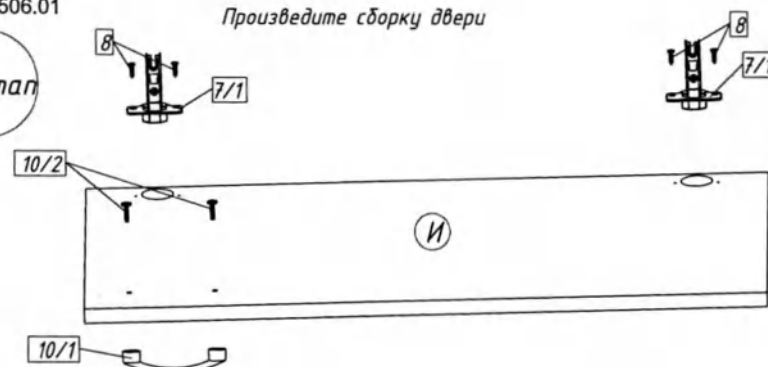

4x1 шт.

7/1x2 шт.

8x4 шт.


10/1x1 шт.

10/2x2 шт.

11 этап

Произведите установку двери

11x1 шт.

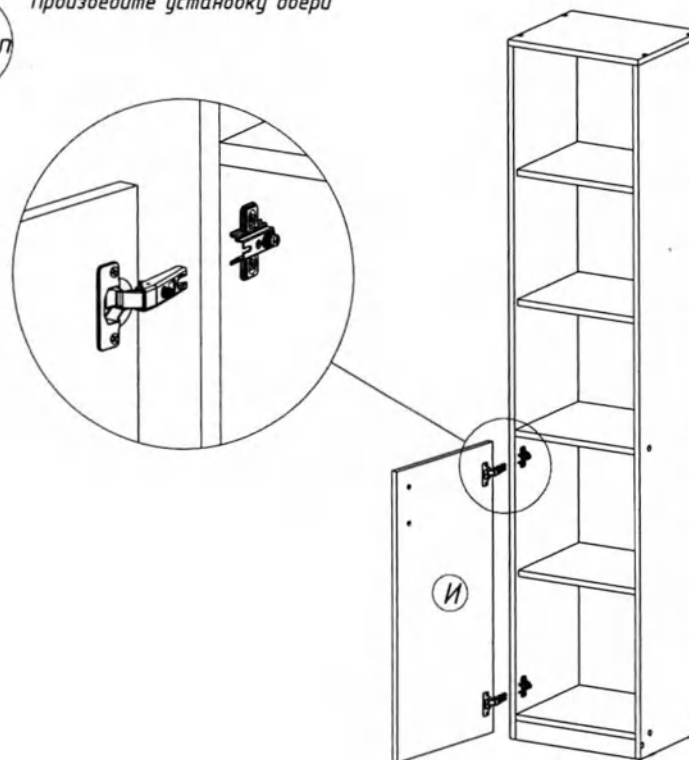

После установки двери произведите регулировку петель, с затяжкой всех винтов и саморезов

Боковая регулировка (перекос двери)




Фронтальная регулировка

Вертикальная регулировка


12 этап


После сборки изделия
наклейте самоклеющийся
логотип компании 6

6x1 см

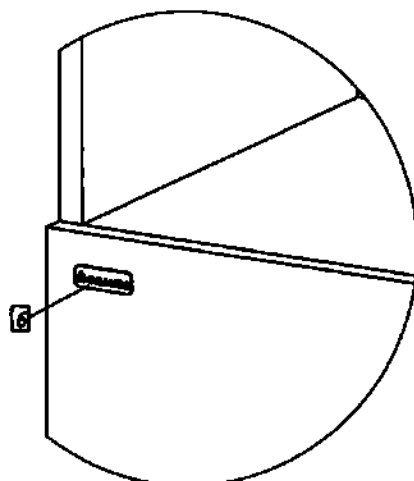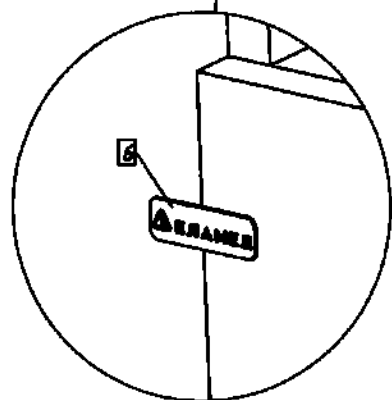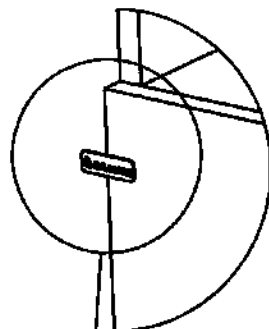

Сборка изделия завершена

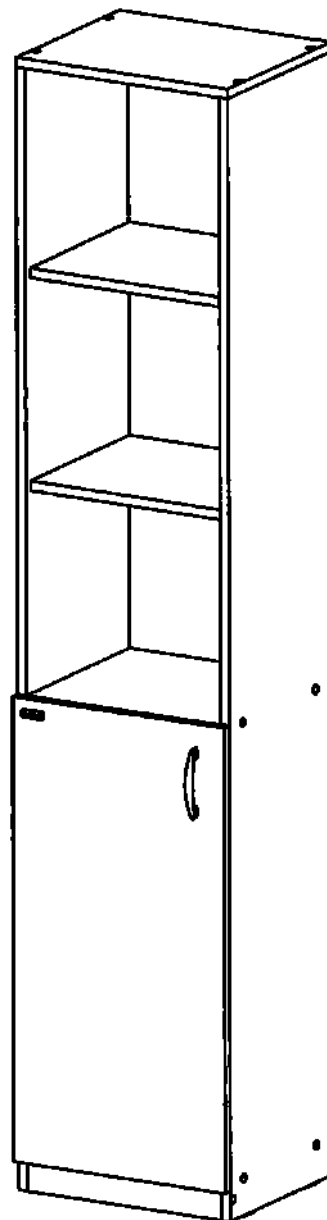

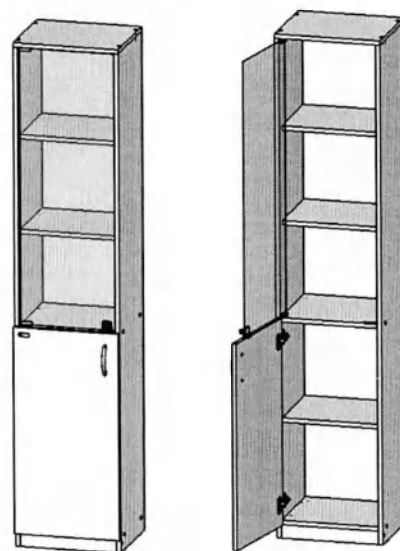

Условные обозначения:

1. А-К : детали

2. 1 - 14 : крепёж и фурнитура

3. ①-⑬ : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Полка межсекционная	1
Д	Крышка	1
Е	Царга	1
Ж	Полка	3
З	Стенка задняя	1
И	Дверь	1
К	Стекланная дверца	1

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1*	14	Конфирмат	
2	14	Заглушка конфирмата	
3	12	Шкант мебельный	
4	12	Полкодержатель	
5	4	Подпятник мебельный	
6	1	Ловостип компании	
7	2 комплекта	Петля накладная, монтажная планка	7/1 7/2
8	8	Саморез 4x16	
9	57	Гвоздь 1,6x25	
10	1 комплект	Ручка мебельная, винты с прессшайбой	10/1 10/2
11	1 комплект	Петля стеклянной дверцы	11/1 11/2 11/3
12	1 комплект	Замок стеклянной дверцы	12/1 12/2 12/3
13	2	Саморез 3x12	
14*	1	Ключ шестигранный	

* Конфирматы 1 закручивать ключом шестигранным 14 заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления


Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

Схема сборки изделия

1 этап


Произведите сборку стенки правой

Рекомендации по сборке: разложите на твердой поверхности несколько листов картона и на них производите сборку изделия.

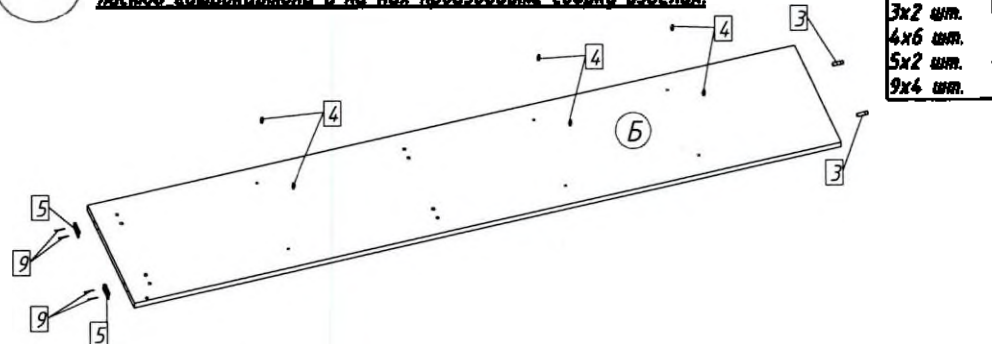


Произведите сборку основания, крышки и полки межсекционной

2 этап

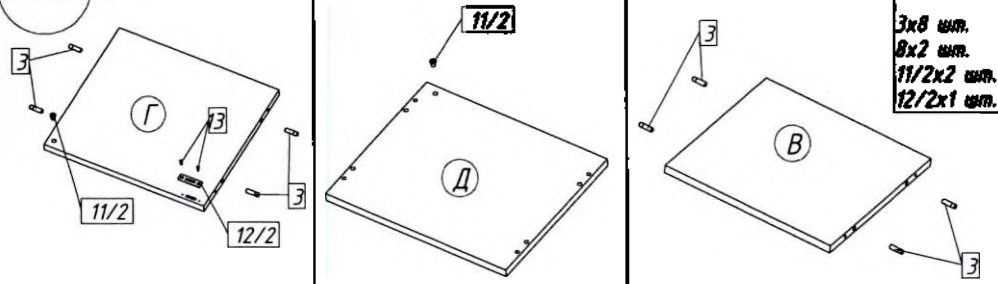


3 этап

Соедините между собой стенку правую, царгу, основание и полку межсекционную

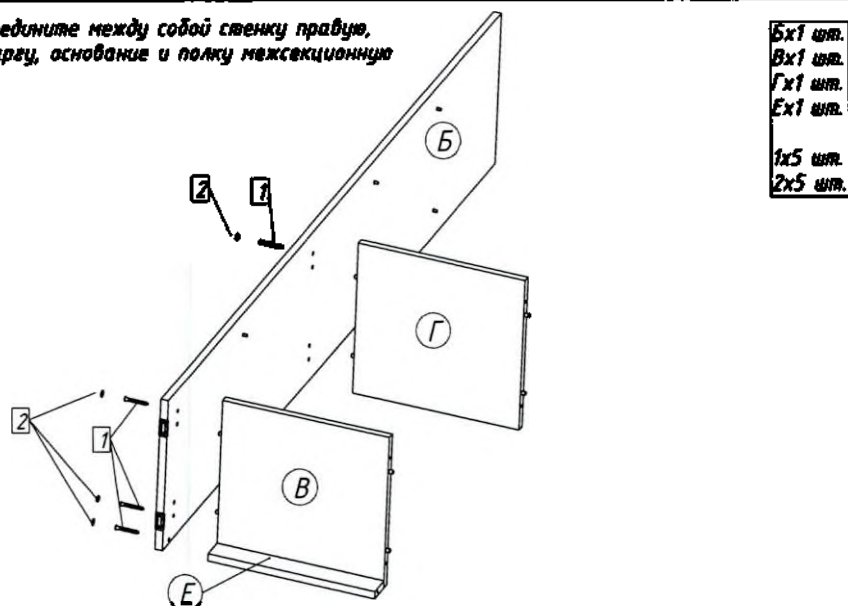

Произведите сборку стенки левой


4 этап

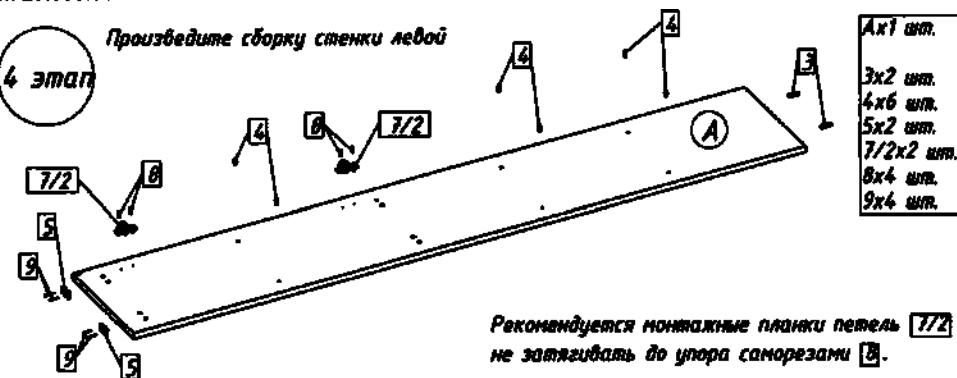

Рекомендуется монтажные планки петлей 7/2 не затягивать до упора саморезами 8.


5 этап

Произведите установку стенки левой

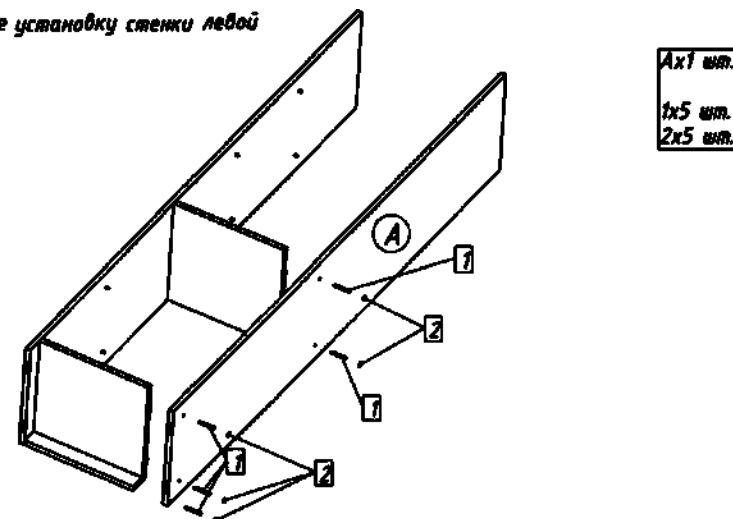

6 этап


Произведите установку крышки

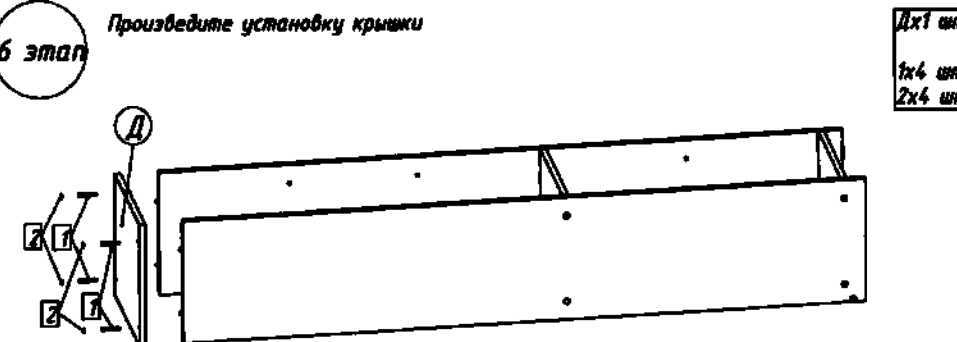

ОМ 29.508.01

Произведите фиксацию стенки задней с помощью гвоздей


7 этап

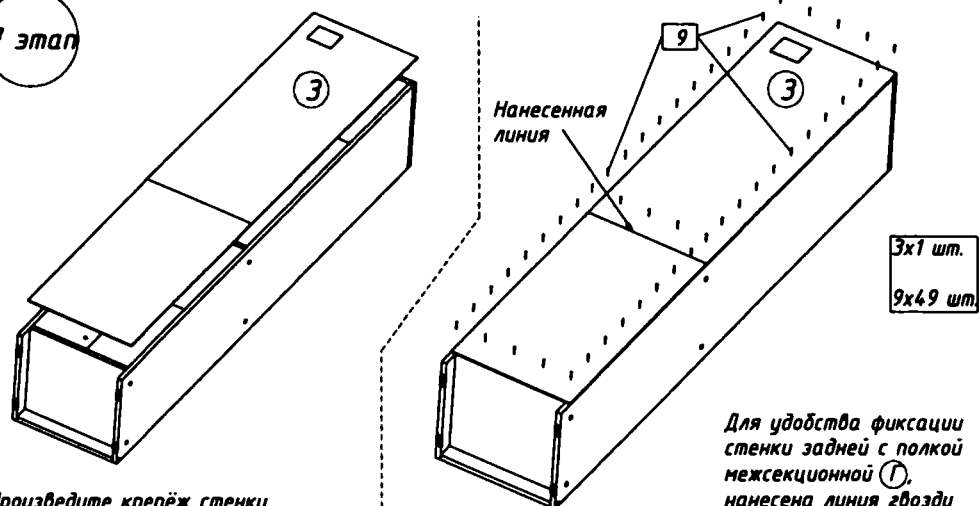

Произведите крепёж стенки задней гвоздями 9 с шагом 95 мм и отступом от края на 8 мм.

Для удобства фиксации стенки задней с полкой межсекционной 7, нанесена линия гвозди следует забивать строго по данной линии

8 этап

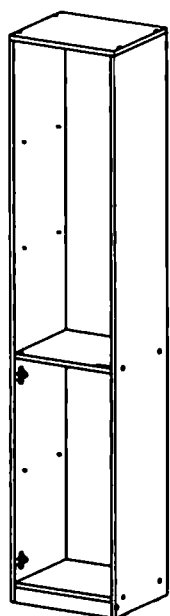

После фиксации стенки переверните конструкцию и поставьте её на ножки.


Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.2)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9 этап

Произведите установку полок


Жх3 шт.

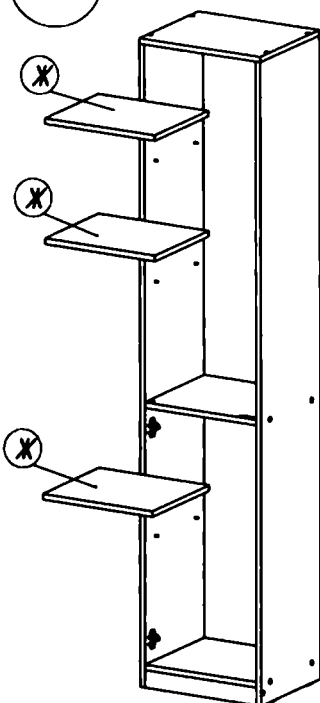

ОМ 29.508.01

Произведите сборку двери


10 этап

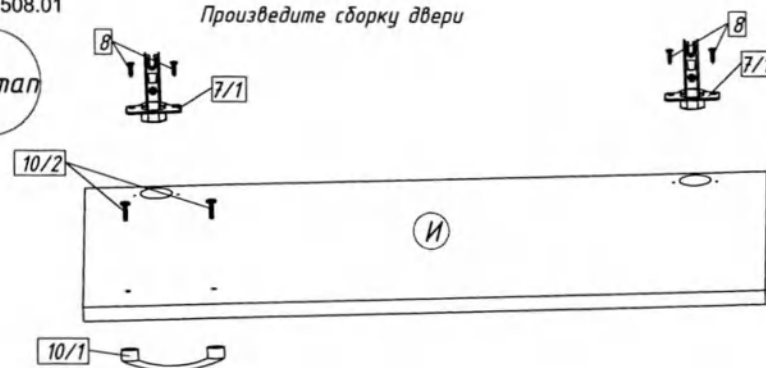

11 этап

Произведите установку двери

Их1 шт.

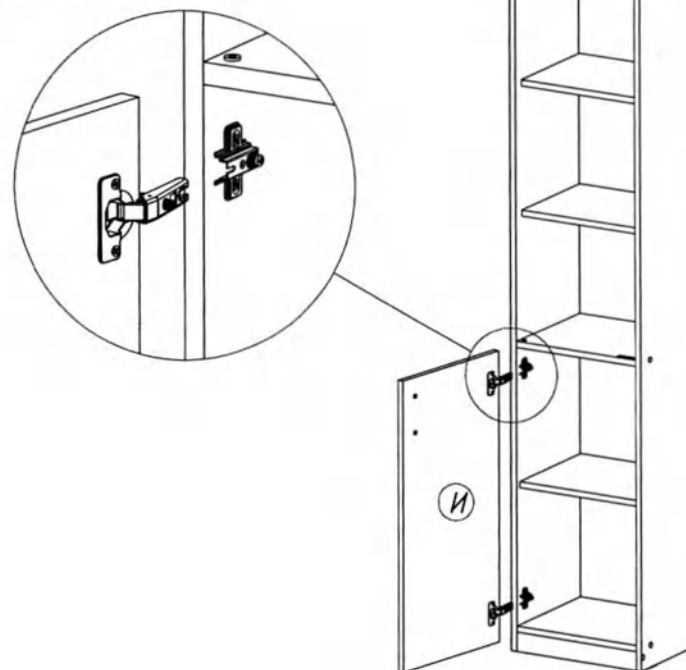


После установки двери производите регулировку петель, с затяжкой всех винтов и саморезов

Боковая регулировка (перекос двери)

Фронтальная регулировка

Вертикальная регулировка

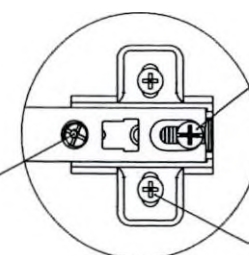

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.2)

ВНИМАНИЕ!!

Во избежание повреждения стеклянной дверцы шкафа её установку рекомендуется выполнять сборщикам в количестве 2-х человек. Также перед установкой необходимо проверить наличие в каждой петле **11** и замке **12** пластиковых прокладок **11/3** и **12/3**.

Если это условие не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия **ЗАПРЕЩЕНА!**

Произведите установку стеклянной дверцы

12 этап

Установите нижнюю петлю **11/1**

Кх1 шт.

11/1х2 шт.

12/1х1 шт.

Установив верхнюю петлю **11/1** и придерживая её от выпадения, вставьте между петель стеклянную дверцу без перекосов.

Установите на дверцу **(К)** замок **12/1**

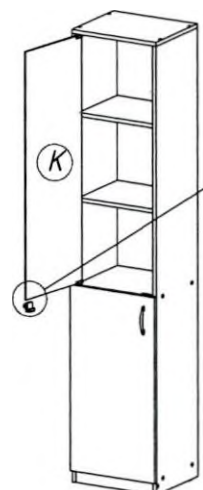


Схема установки замка на стеклянной дверце


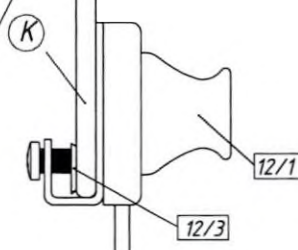


Схема установки стеклянной дверцы в петлю

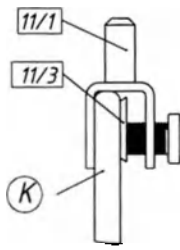



Отрегулируйте положение замка на дверце так, чтобы его язычок попадал в ответную планку.

Внимание: Установку стеклянной дверцы производить только в вертикальном положении шкафа. После установки стеклянной дверцы **(К)** необходимо затянуть все фиксирующие винты петель **11** и замка **12** до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов. Это может привести к порче стеклянной дверцы.


13 этап

6х1 шт.

После сборки изделия наклейте самоклеящийся логотип компании **6**

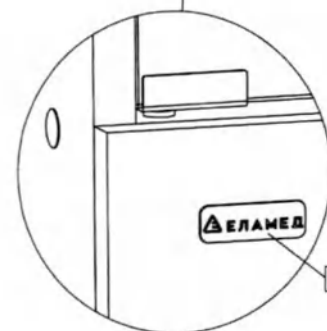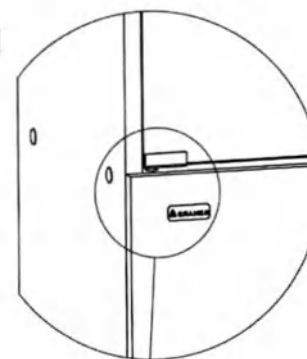


Сборка изделия завершена

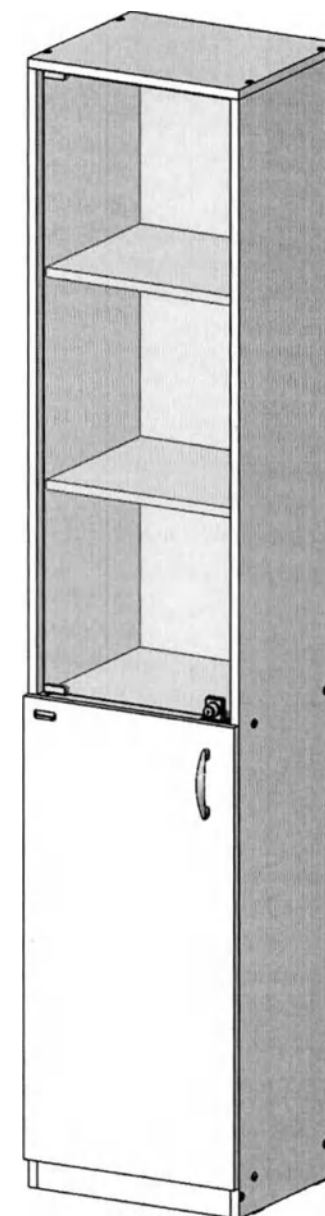

Инструкция по сборке изделия
Шкафы медицинские по ГИКС.942810.107 ТУ

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.3)

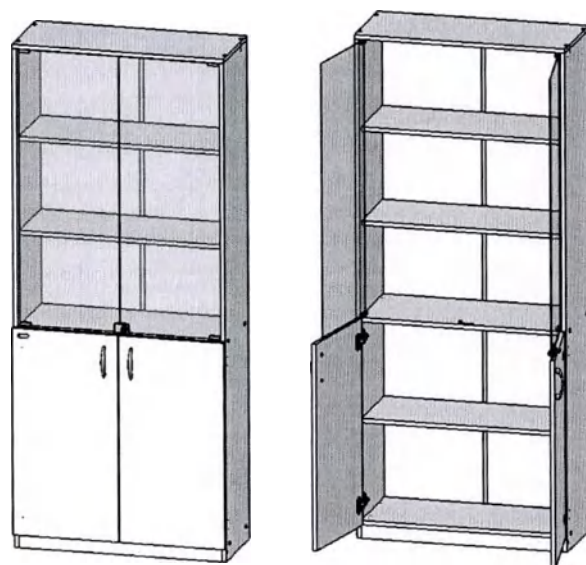

Условные обозначения:

1. А-О : детали

2. [7] - [15] : крепёж и фурнитура

3. ① - ⑬ : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Крышка	1
Д	Царга	1
Е	Полка межсекционная	1
Ж	Полка верхняя	2
З	Полка нижняя	1
И	Стенка задняя	1
К	Стенка задняя	1
Л	Дверь нижняя левая	1
М	Дверь нижняя правая	1
Н	Стеклопанель дверца левая	1
О	Стеклопанель дверца правая	1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
[1*]	14	Конфирмат	
[2]	14	Заглушка конфирмата	
[3]	12	Шкант мебельный	
[4]	12	Полкодержатель	
[5]	4	Подпятник мебельный	
[6]	1	Поворотник комплект	
[7]	4 комплекта	Петля накладная, монтажная планка	7/1 7/2
[8]	16	Саморез 4x16	
[9]	72	Гвоздь 1,6x25	
[10]	2 комплекта	Брус соединительный	10/1 10/2
[11]	2 комплекта	Ручка мебельная, винты с прессшайбой	11/1 11/2
[12]	2 комплекта	Петля стеклянной дверцы	12/1 12/2 12/3
[13]	1 комплект	Замок стеклянной дверцы	13/1 13/2 13/3 13/4
[14]	2	Саморез 3x12	
[15*]	1	Ключ шестигранный	

* Конфирматы [1] закручивать ключом шестигранным [15] заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления


Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

Схема сборки изделия

1 этап


Произведите сборку стенки правой

Рекомендации по сборке: разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона и на них производите сборку изделия.

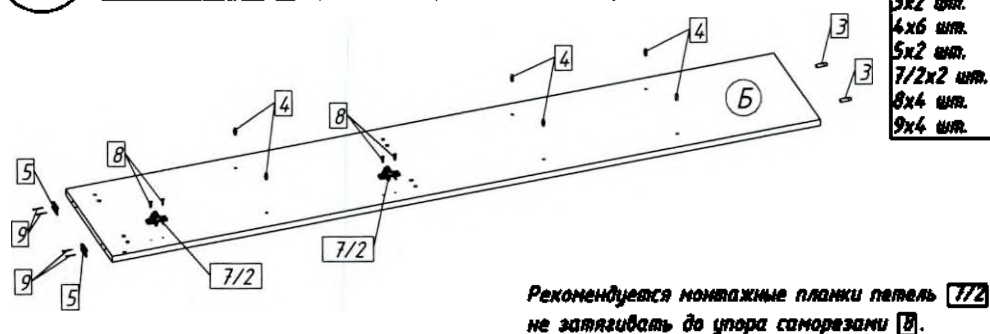


Произведите сборку основания, крышки и полки межсекционной

2 этап

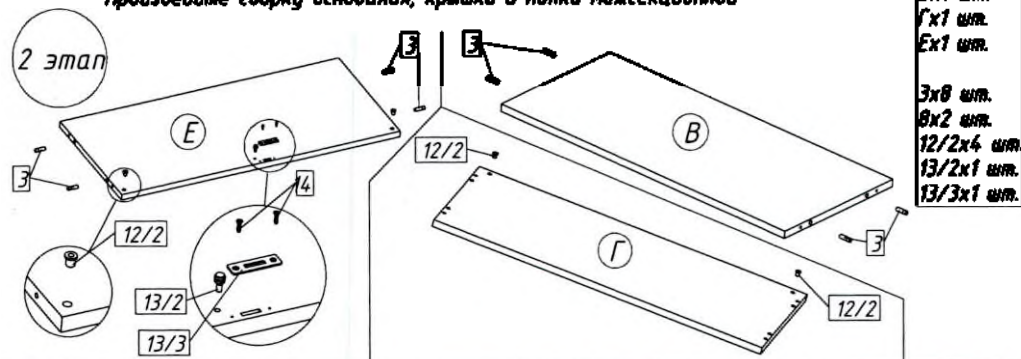


3 этап

Соедините между собой стенку правую, царгу, основание и полку межсекционную

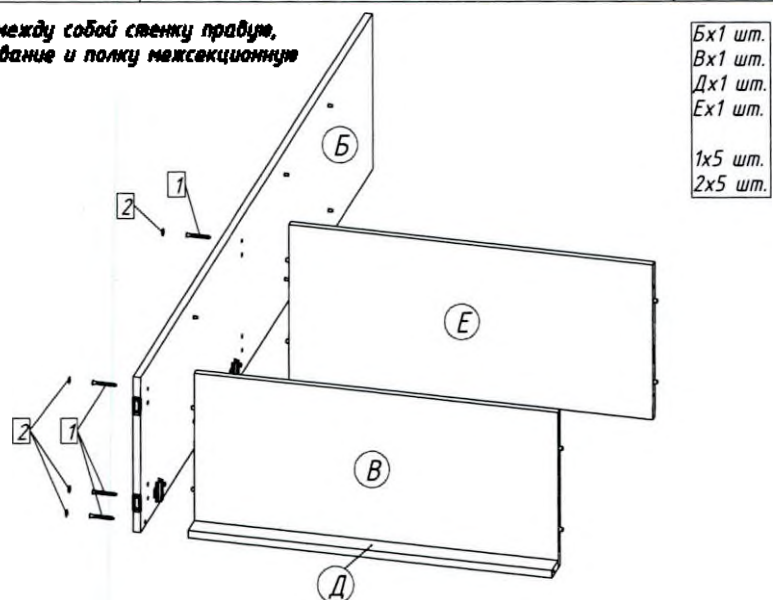


Произведите сборку стенки левой

4 этап

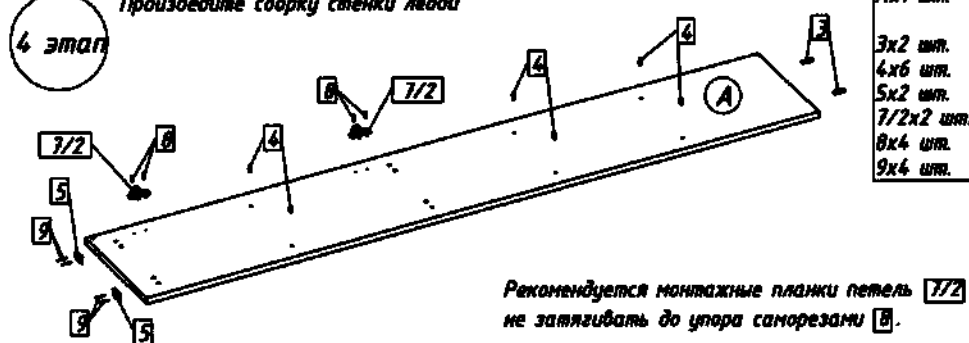


Произведите установку стенки левой



5 этап

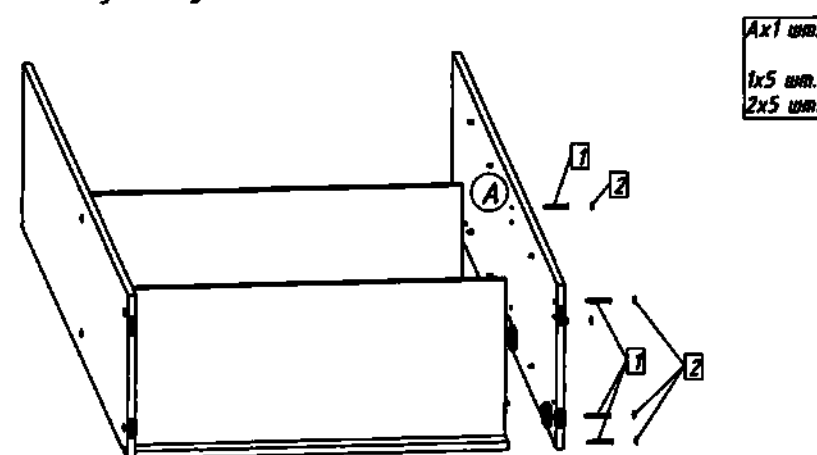



Произведите установку крышки

6 этап

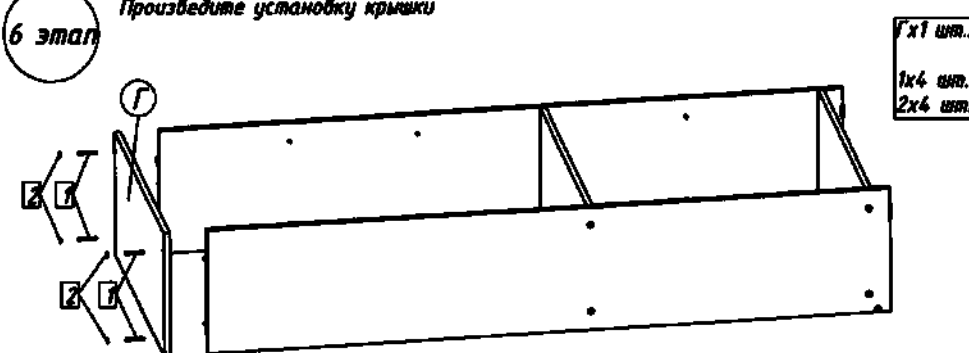

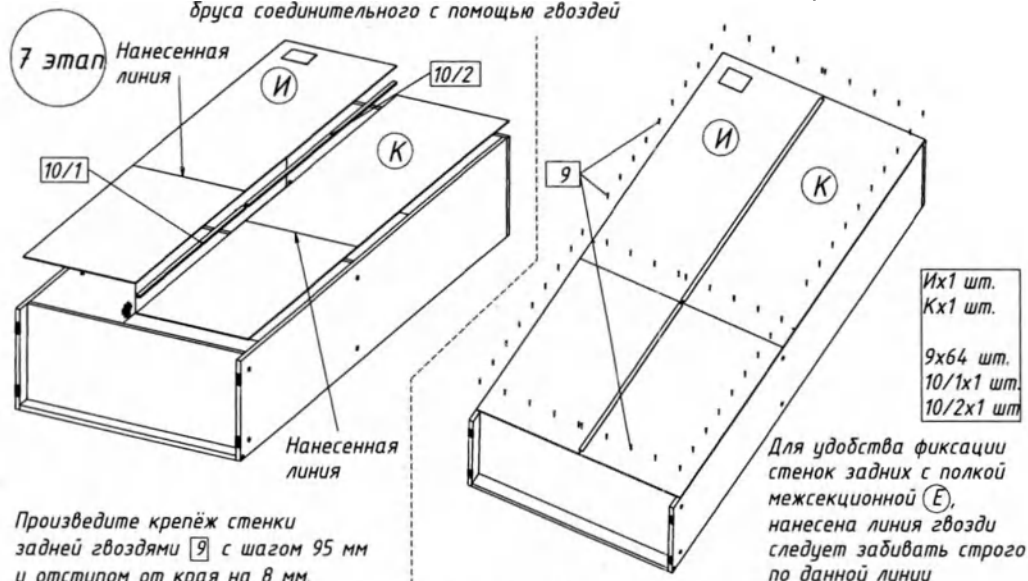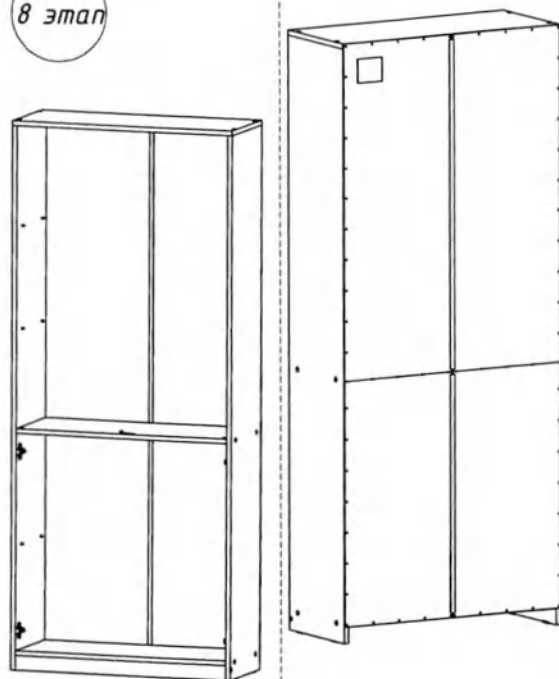**8 этап**

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.3)

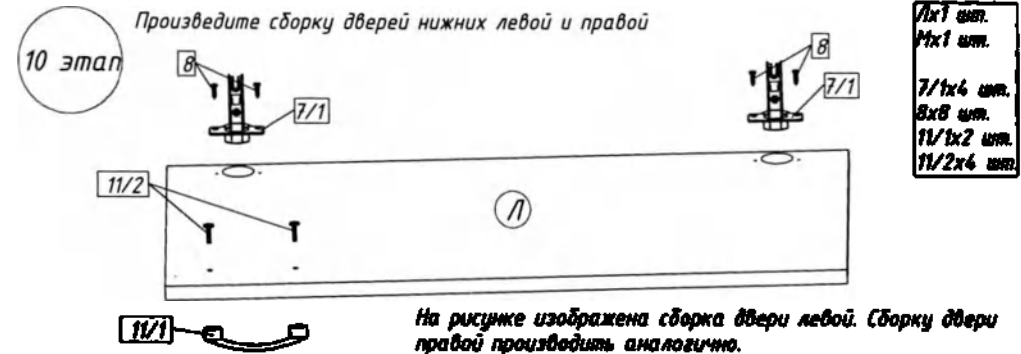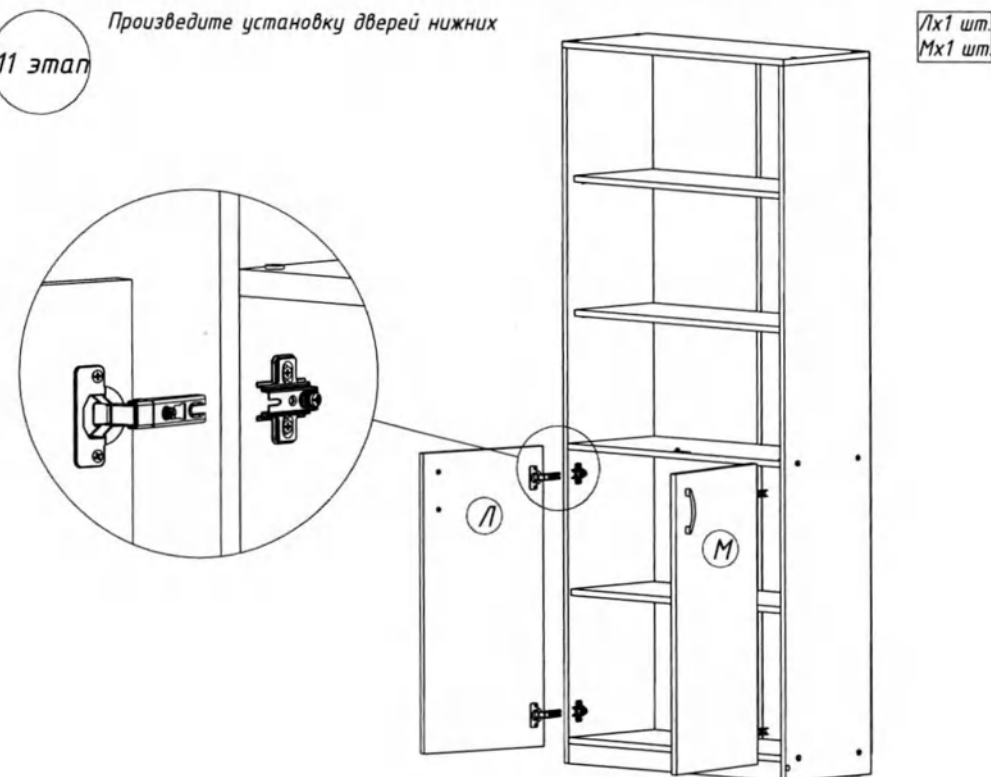**11 этап**

После установки дверей произведите регулировку петель, с затяжкой всех винтов и саморезов

Боковая регулировка (перекос двери)

Фронтальная регулировка

Вертикальная регулировка

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.3)

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения стеклянных дверей шкафа их установку рекомендуется выполнять сборщикам в количестве 2-х человек. Также перед их установкой необходимо проверить наличие в каждой петле 12 и замке 13 пластиковых прокладок 12/3 и 13/4.

Если это условие не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия **ЗАПРЕЩЕНА!!!**

12 этап




Произведите установку левой и правой стеклянной двери

Установите нижние петли 12/1

Нх1 шт.
Ох1 шт.
12/1х4 шт.
13/1х1 шт.

Установите верхние петли 12/1 и придерживая их от выпадения, вставьте между петель стеклянные двери без перекосов.

Установите на правую дверь 0 замок 13/1

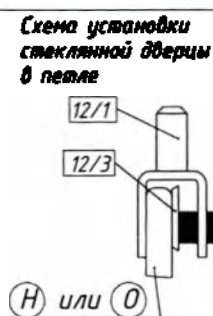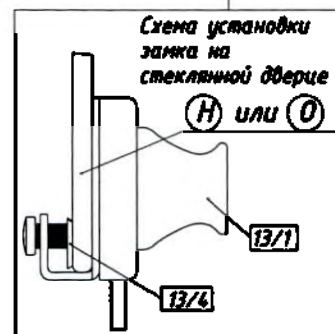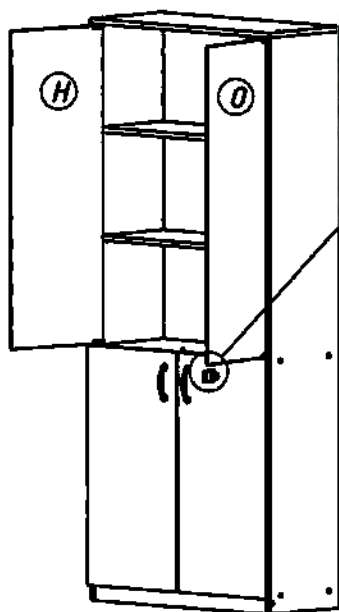


Внимание: Установку стеклянных дверей производить только в вертикальном положении шкафа. После установки стеклянных дверей H и O необходимо затянуть все фиксирующие винты петель 12 и замка 13 до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов. Это может привести к порче стеклянной двери.

Отрегулируйте положение замка на двери так, чтобы его язычок попадал в ответную планку.


13 этап

6х1 шт.

После сборки изделия наклейте самоклеющийся логотип компании 6

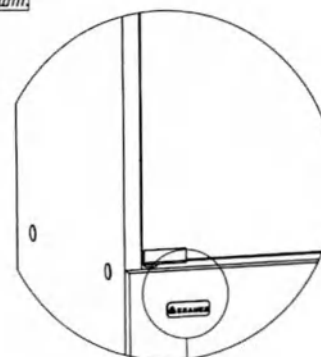


Сборка изделия завершена

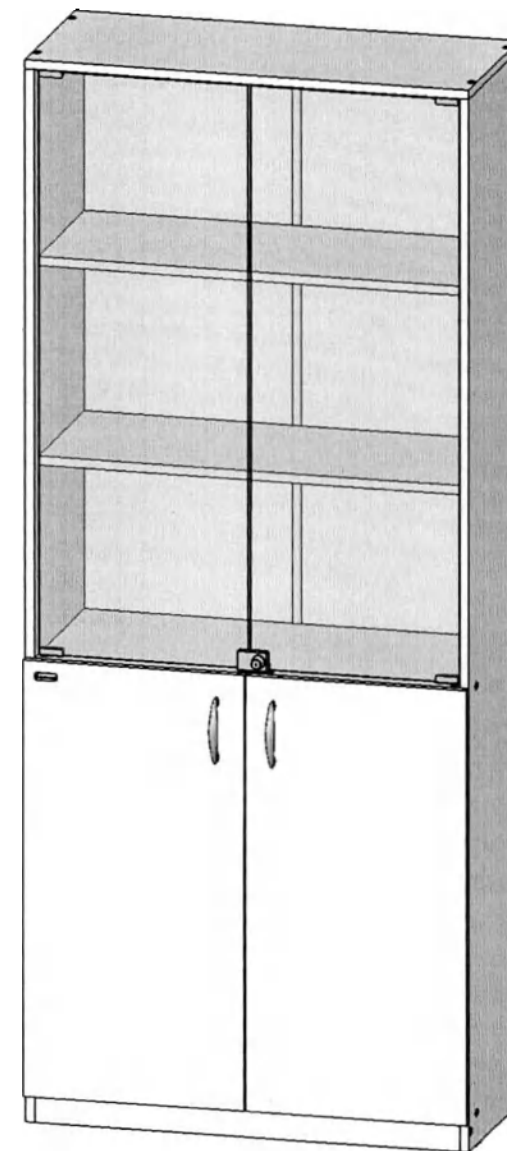

Инструкция по сборке изделия
Шкафы медицинские по ГИКС.942810.107 ТУ

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.4)

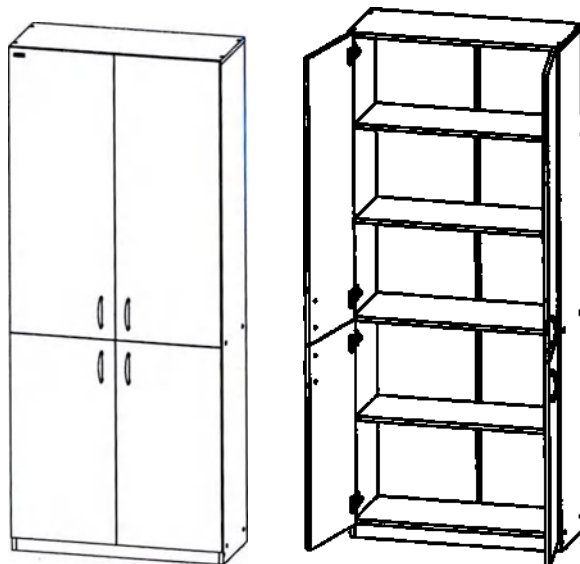

Условные обозначения:

1. А-Н : детали

2. 1 - 12 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 12 : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Крышка	1
Д	Царга	1
Е	Полка	3
Ж	Стенка задняя левая	1
З	Стенка задняя правая	1
И	Полка межсекционная	1
К	Дверь нижняя правая	1
Л	Дверь нижняя левая	1
М	Дверь верхняя правая	1
Н	Дверь верхняя левая	1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1*	14	Конфирмат	
2	14	Заглушка конфирмата	
3	12	Шкант мебельный	
4	12	Полкодержатель	
5	4	Подпятник мебельный	
6	1	Логотип компании	
7	8 комплектов	Петля накладная, монтажная планка	
8	32	Саморез 4x16	
9	72	Гвоздь 1,6x25	
10	4 комплекта	Ручка мебельная, винты с прессшайбой	
11	2 комплекта	Брус соединительный	
12*	1	Ключ шестигранный	

* Конфирматы 1 закручивать ключом шестигранным 12 заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления


Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

Схема сборки изделия

1 этап

Произведите сборку стенки правой


Рекомендации по сборке: разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона и на них производите сборку изделия.

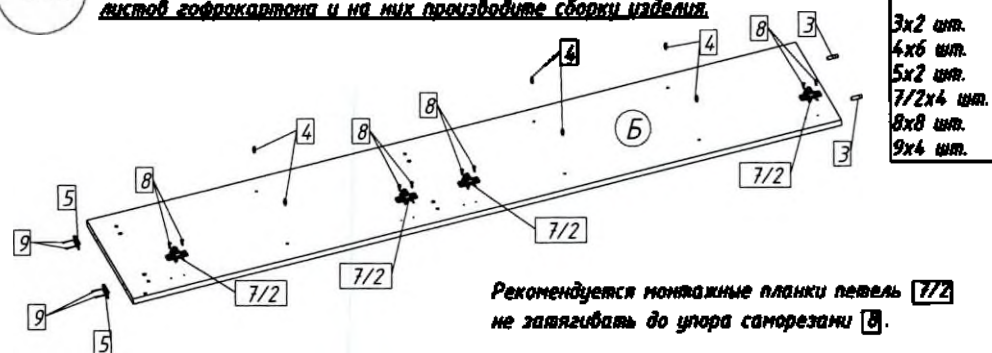

Рекомендуется монтажные планки петлей 7/2 не затягивать до упора саморезами 3.


2 этап

Произведите сборку основания и межъярусной перегородки

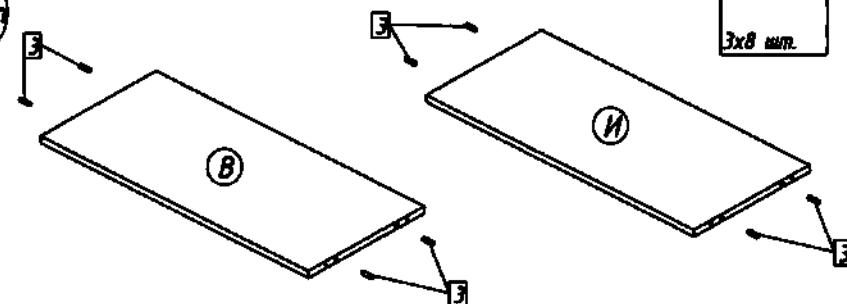


3 этап

Соедините между собой стенку правую, царгу и основание

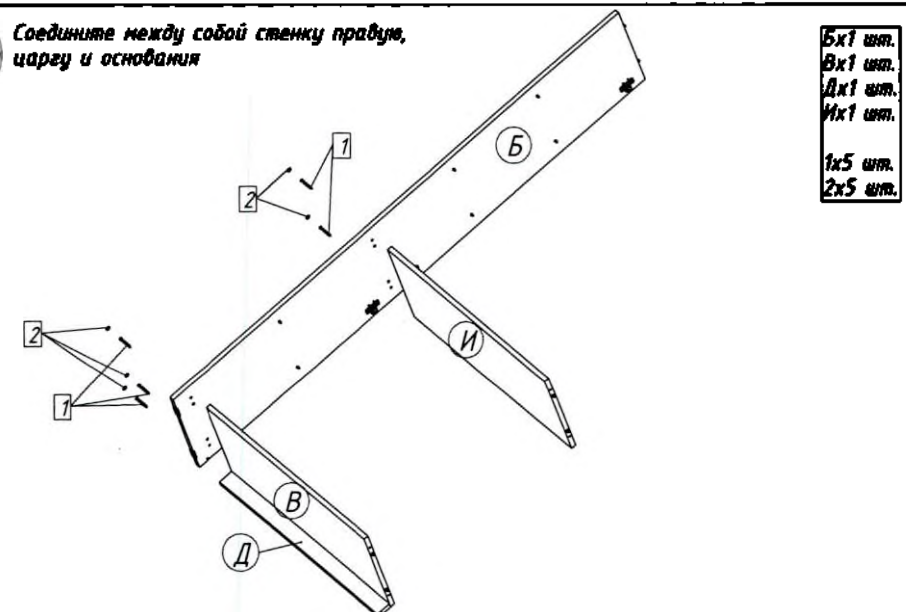

Произведите сборку стенки левой


4 этап

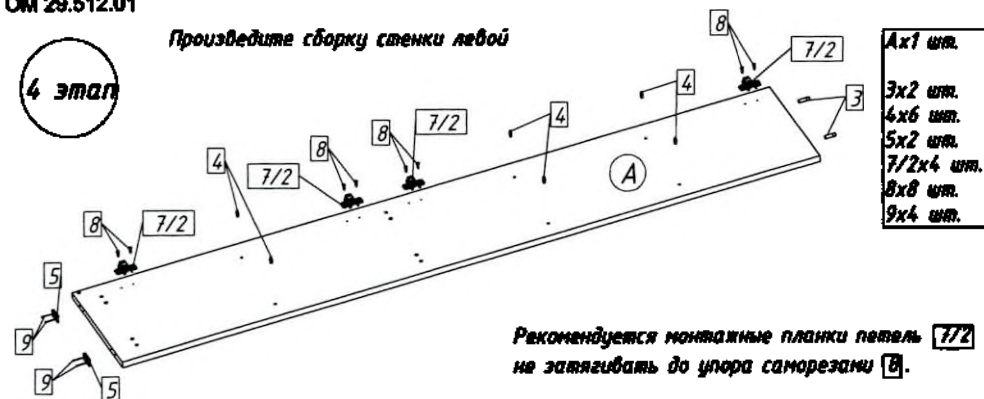

Рекомендуется монтажные планки петлей 7/2 не затягивать до упора саморезами 3.


5 этап

Произведите установку стенки левой


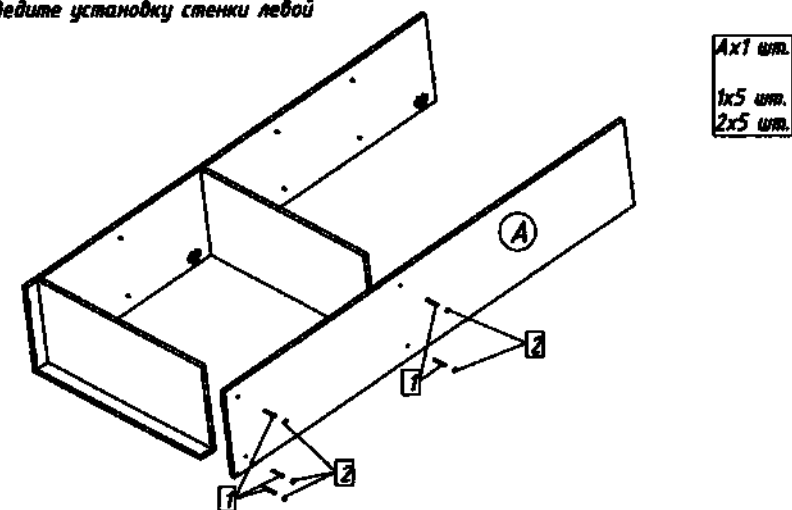


6 этап

Произведите установку крышки

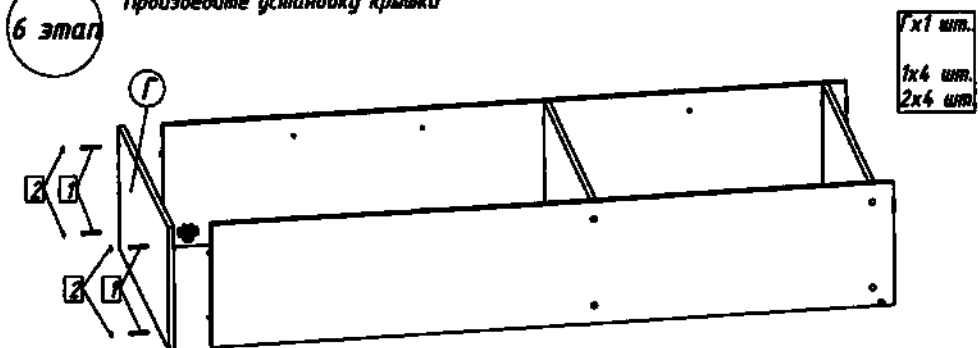


Произведите фиксацию стенки задней левой, стенки задней правой и бруса соединительного с помощью гвоздей

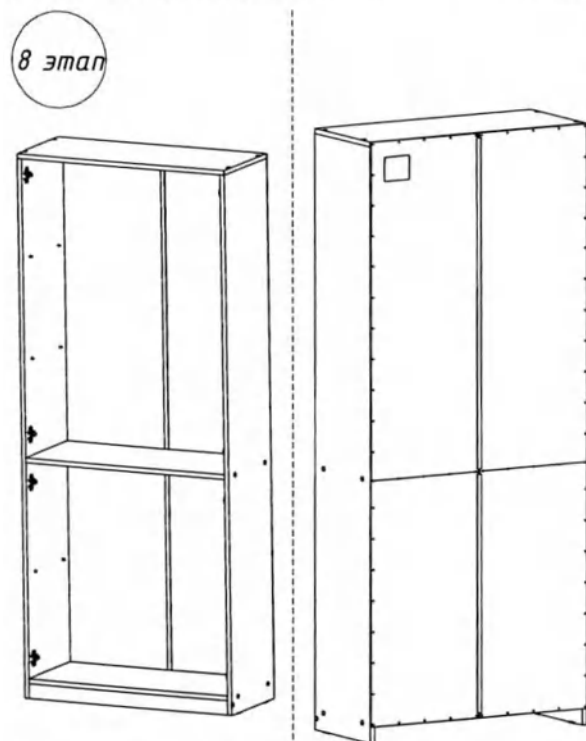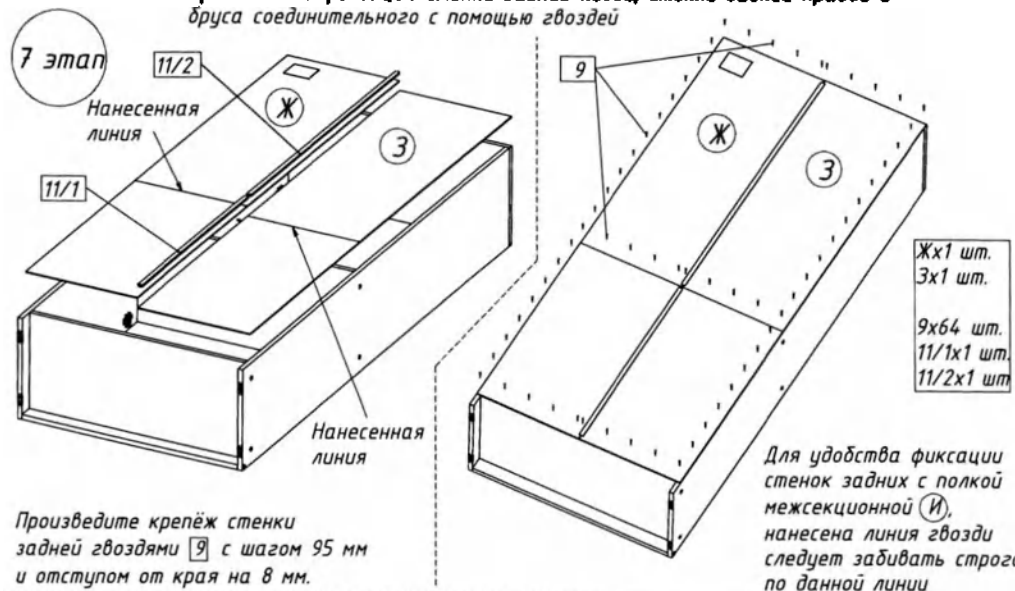

После фиксации стенки переверните конструкцию и поставьте её на ножки.

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.4)

Произведите сборку дверей

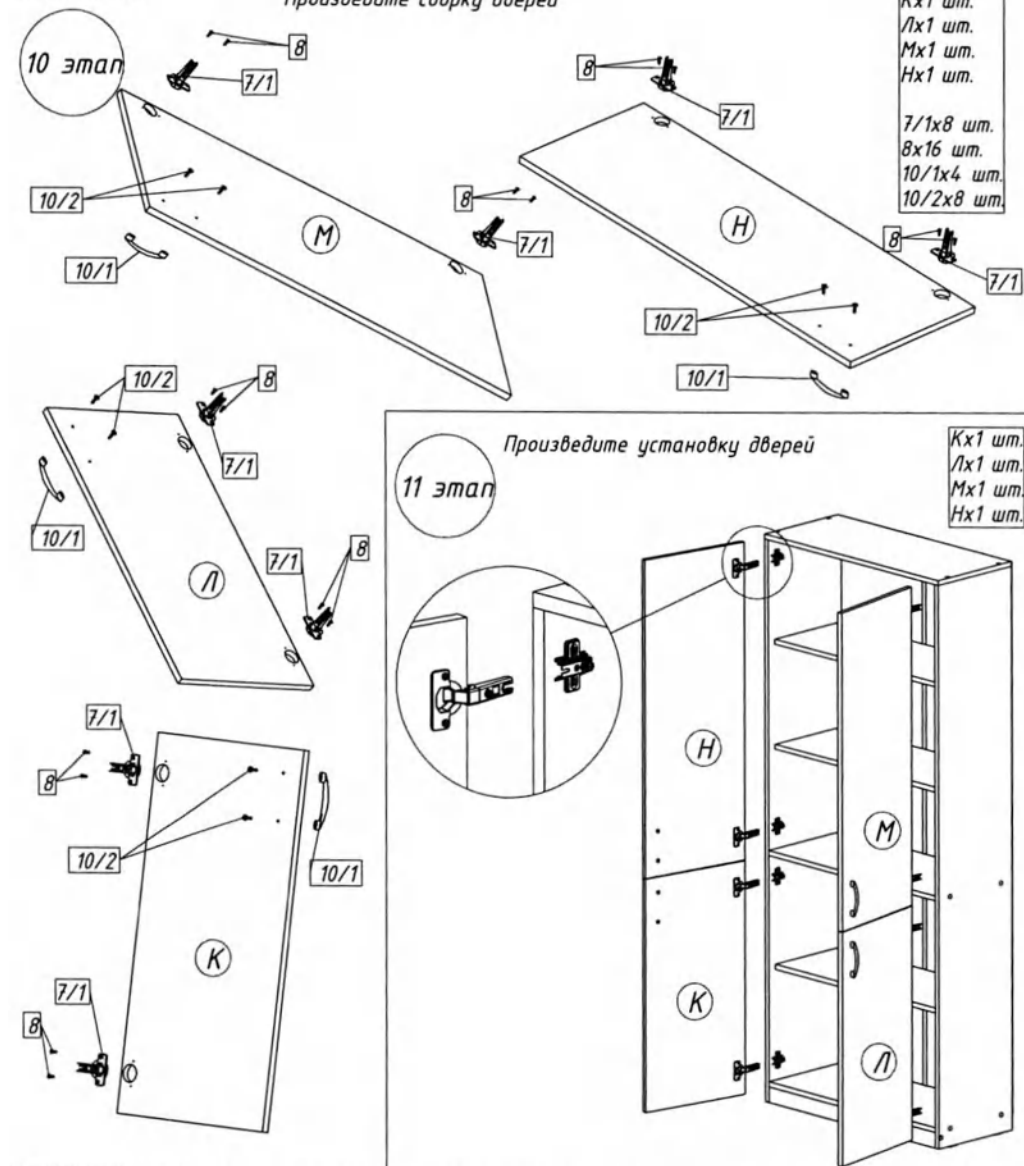

После установки двери произведите регулировку петель, с затяжкой всех винтов и саморезов

Боковая регулировка (перекос двери)

Фронтальная регулировка

Вертикальная регулировка



Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.4)

ОМ 29.512.01


12 шт

После сборки изделия
наклейте самоклеющийся
логотип компании


6х1 шт

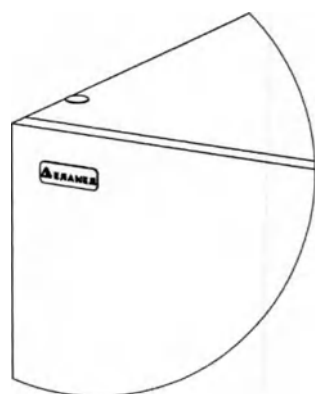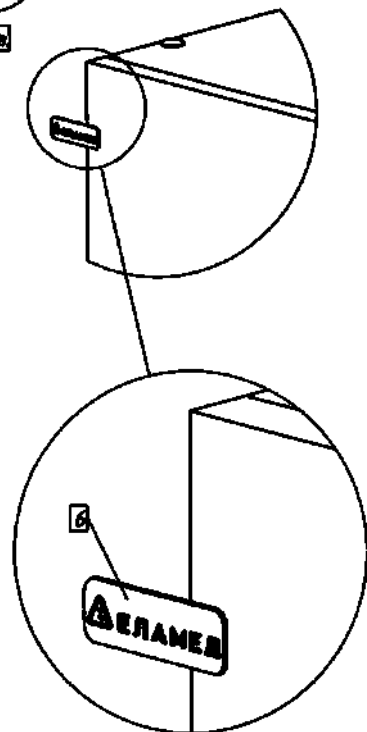

Сборка изделия завершена

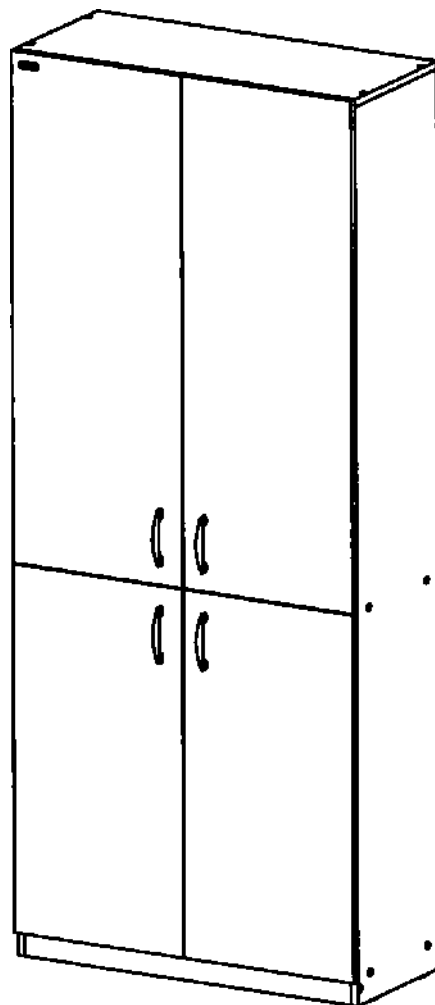

Инструкция по сборке изделия
Шкафы медицинские по ГИКС.942810.107 ТУ
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.5)

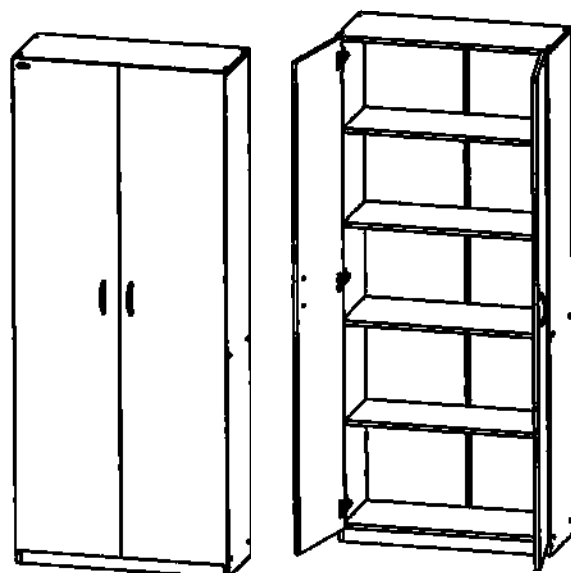

Условные обозначения:

1. А-Л : детали
 2. 1 - 12 : крепёж и фурнитура
 3. 1 - 12 : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Крышка	1
Д	Царга	1
Е	Полка	3
Ж	Стенка задняя левая	1
З	Стенка задняя правая	1
И	Полка межсекционная	1
К	Дверь правая	1
Л	Дверь левая	1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1*	14	Конфирмат	
2	14	Заглушка конфирмата	
3	12	Шкант мебельный	
4	12	Полкодержатель	
5	4	Подпятник мебельный	
6	1	Логотип компании	
7	6 комплектов	Пятля накладная, монтажная планка	7/1 7/2
8	24	Саморез 4x16	
9	72	Гвоздь 1,6x25	
10	2 комплекта	Ручка мебельная, винты с прессшайбой	10/1 10/2
11	2 комплекта	Брус соединительный	11/1 11/2
12*	1	Ключ шестигранный	


* Конфирматы 1* закручивать ключом шестигранным 12* заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

Схема сборки изделия

1 этап

Произведите сборку стенки правой
 Рекомендации по сборке: разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона и на них производите сборку изделия.

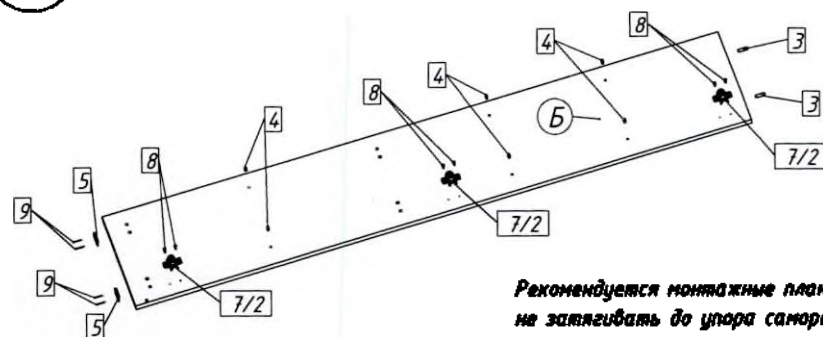


5x1 шт.
 3x2 шт.
 4x6 шт.
 5x2 шт.
 7/2x3 шт.
 8x6 шт.
 9x4 шт.

Рекомендуется монтажные планки петель 7/2
 не затягивать до упора саморезами 8.

2 этап


Произведите сборку основания и межъярусной перегородки

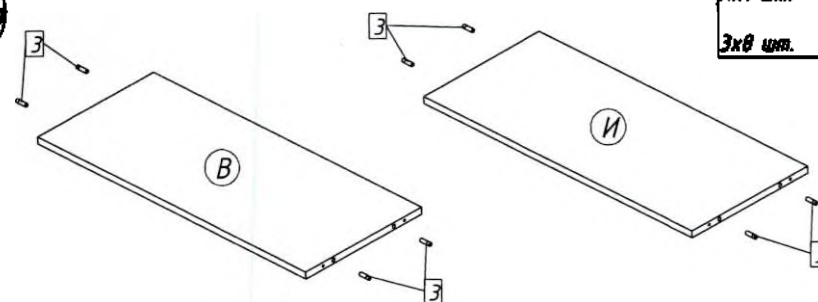

8x1 шт.
 Иx1 шт.
 3x8 шт.

3 этап


Соедините между собой стенку правую,
 царгу и основание

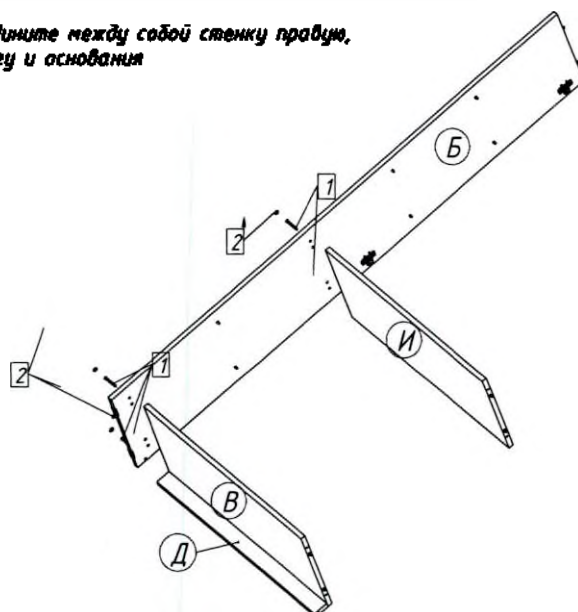

5x1 шт.
 8x1 шт.
 Дx1 шт.
 Иx1 шт.
 1x5 шт.
 2x5 шт.

Произведите сборку стенки левой

4 этап

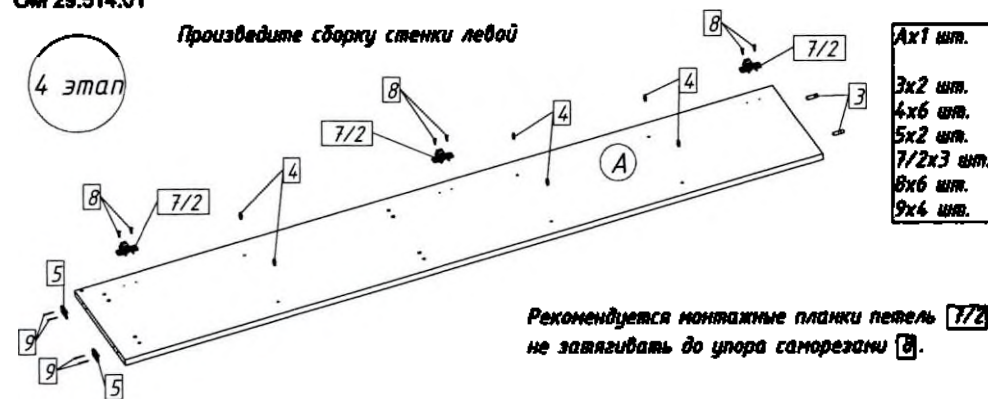


Аx1 шт.
 3x2 шт.
 4x6 шт.
 5x2 шт.
 7/2x3 шт.
 8x6 шт.
 9x4 шт.

Рекомендуется монтажные планки петель 7/2
 не затягивать до упора саморезами 8.

5 этап


Произведите установку стенки левой

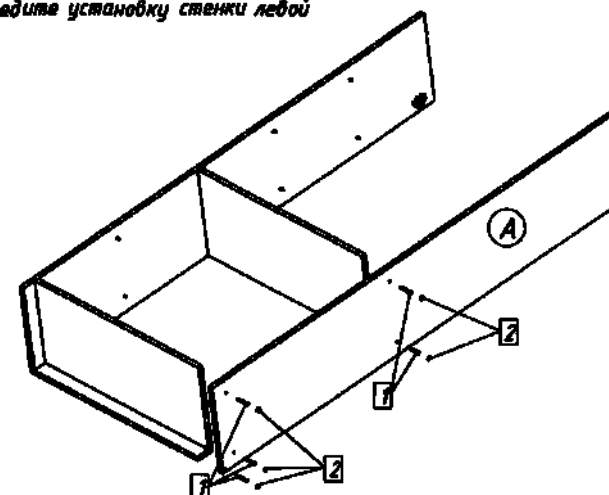

Аx1 шт.
 1x5 шт.
 2x5 шт.

6 этап


Произведите установку крышки

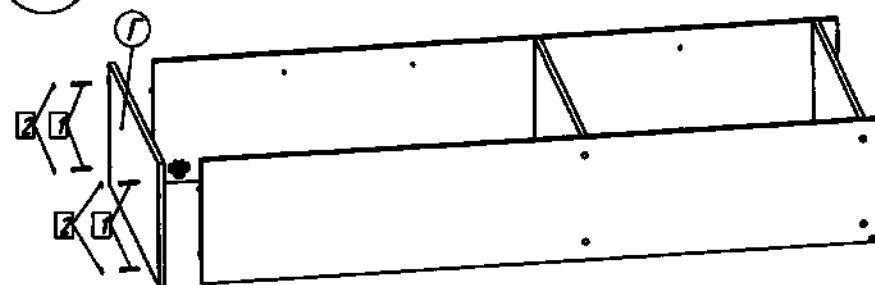

Гx1 шт.
 1x4 шт.
 2x4 шт.

ОМ 29.514.01


Произведите фиксацию стенки задней левой, стенки задней правой и бруса соединительного с помощью гвоздей

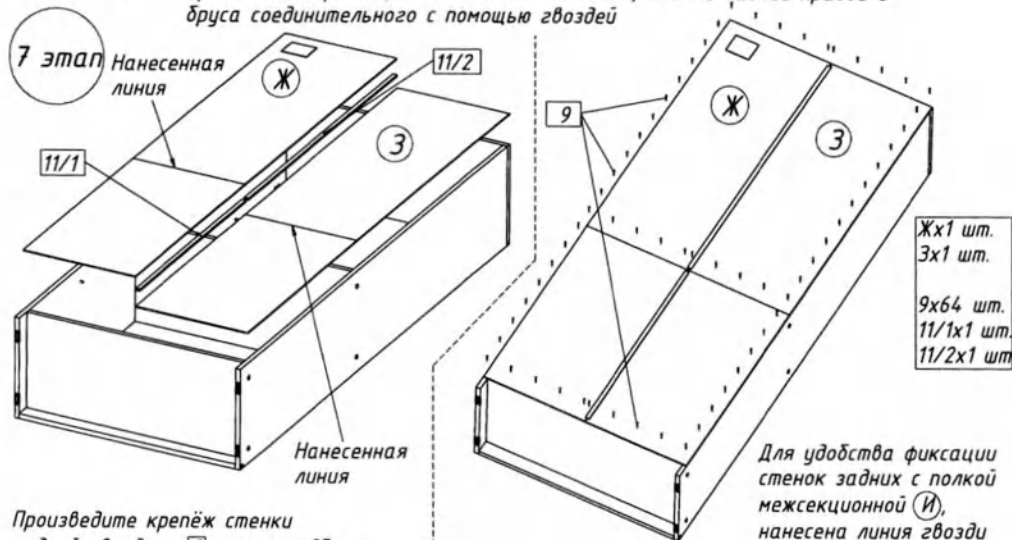

Произведите крепёж стенки задней гвоздями 9 с шагом 95 мм и отступом от края на 8 мм.

Для удобства фиксации стенок задних с полкой межсекционной И, нанесена линия гвозди следует забивать строго по данной линии

8 этап

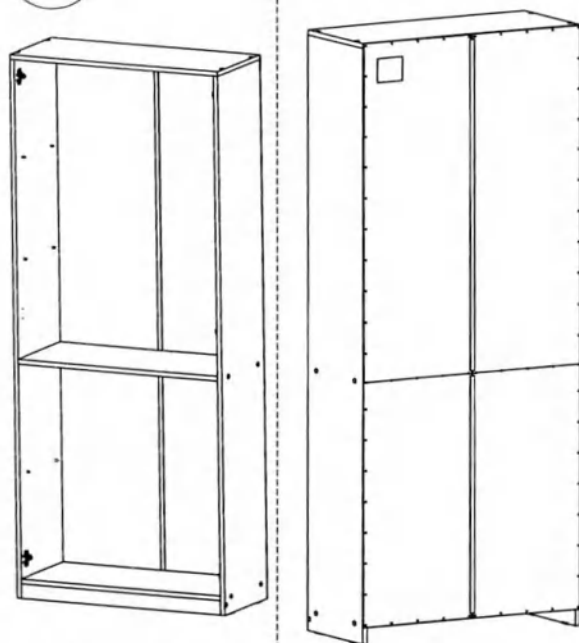


После фиксации стенки переверните конструкцию и поставьте её на ножки.

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.5)

Произведите установку полок


9 этап

Ех3 шт.

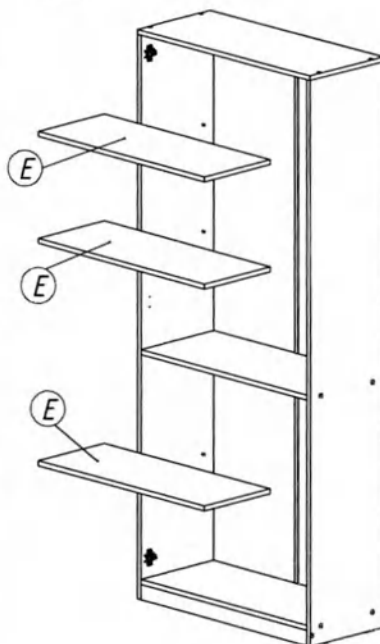


ОМ 29.514.01

Произведите сборку дверей

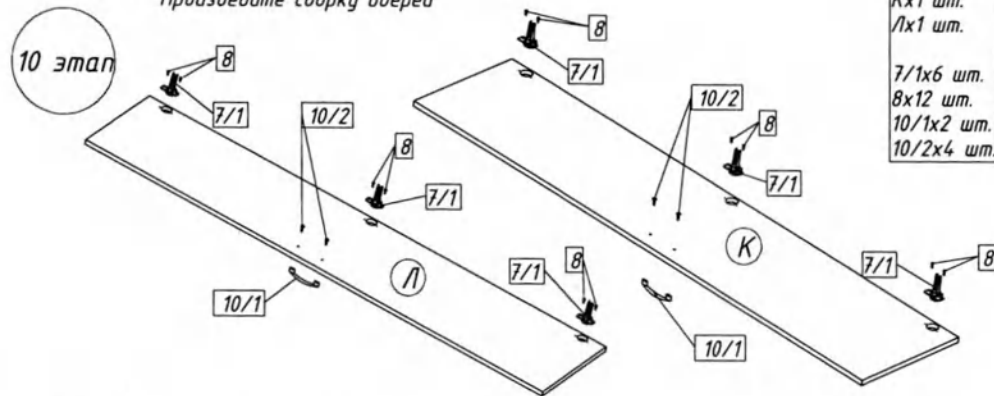

11 этап

Произведите установку дверей

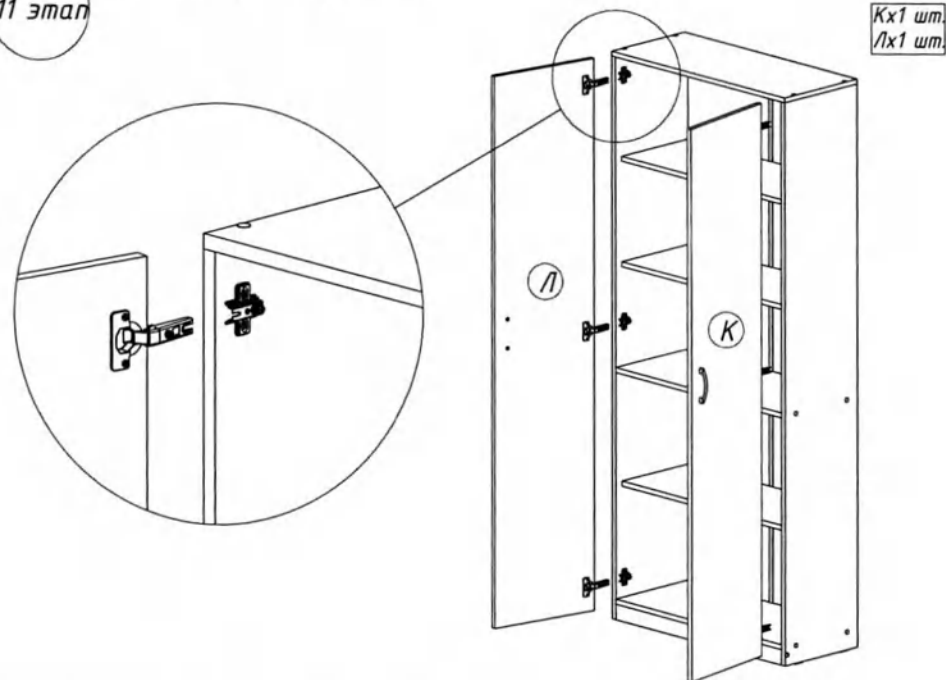


После установки двери произведите регулировку петель, с затяжкой всех винтов и саморезов

Боковая регулировка (перекос двери)

Фронтальная регулировка

Вертикальная регулировка



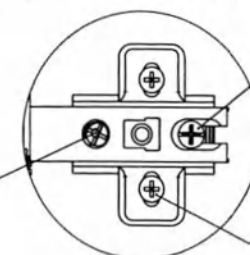


Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.5)


12 этап


После сборки изделия
наклейте самоклеющийся
логотип компании 6

6х1 см

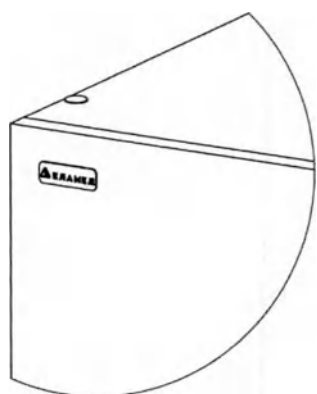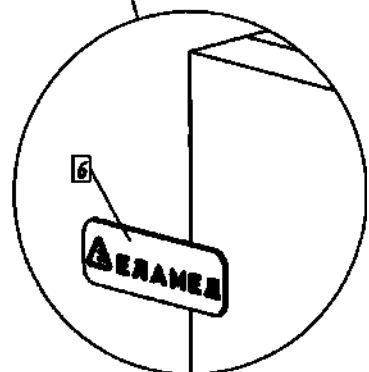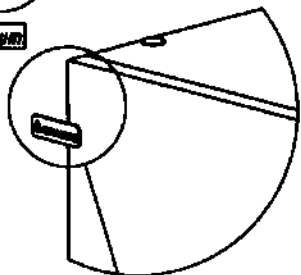

Сборка изделия завершена

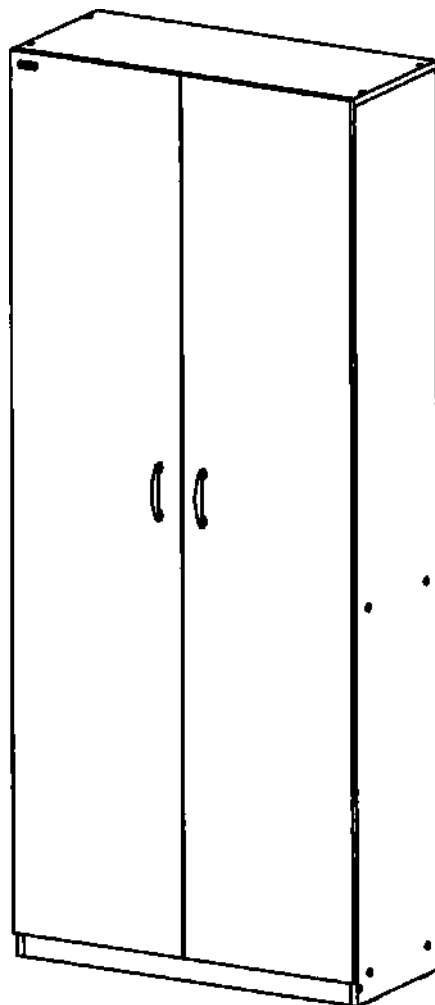

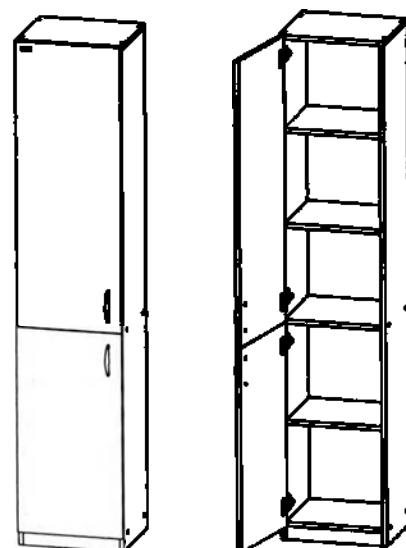

Условные обозначения:

1. А-К : детали

2. [1] - [11] : крепёж и фурнитура

3. ①-⑫ : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Полка межсекционная	1
Д	Крышка	1
Е	Цара	1
Ж	Полка	3
З	Стенка задняя	1
И	Дверь нижняя	1
К	Дверь верхняя	1

Арт.	Кол - во	Обозначение	
[1*]	16	Конфирмат	
[2]	16	Заглушка конфирмата	
[3]	12	Шкант мебельный	
[4]	12	Полкодержатель	
[5]	4	Подпятник мебельный	
[6]	1	Логотип компании	
[7]	4 комплекта	Петля накладная, монтажная планка	7/1 7/2
[8]	16	Саморез 4x16	
[9]	57	Гвоздь 1,6x25	
[10]	2 комплекта	Ручка мебельная, винты с прессшайбой	10/1 10/2
[11*]	1	Ключ шестигранный	

* Конфирматы [1] закручивать ключом шестигранным [11] заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления


Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

Схема сборки изделия

1 этап

Произведите сборку стенки правой

Рекомендации по сборке: разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона и на них производите сборку изделия.

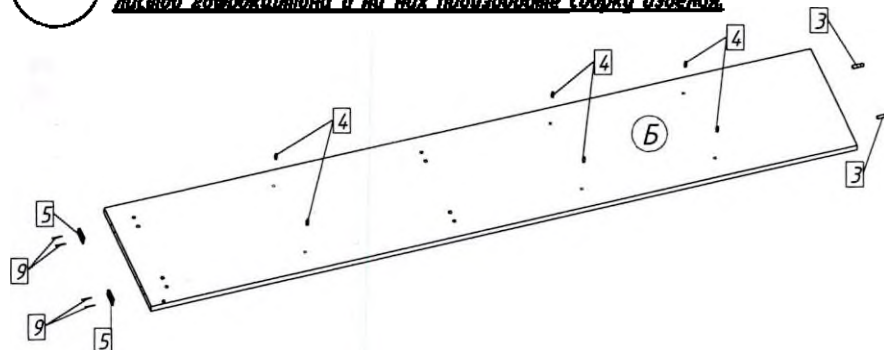

5x1 шт.

3x2 шт.


4x6 шт.

5x2 шт.

9x4 шт.

2 этап

Произведите сборку основания и полки межсекционной

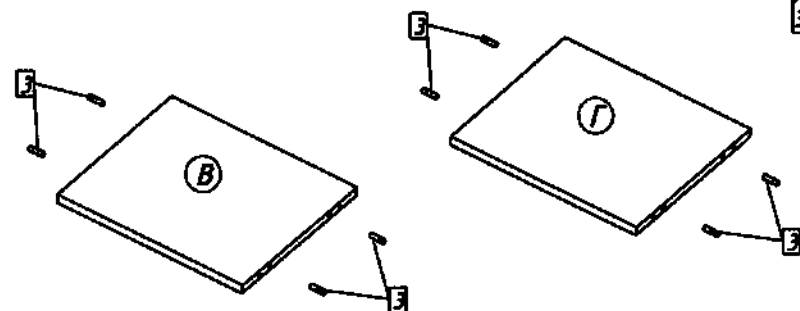


6x1 шт.

7x1 шт.

3x8 шт.

3 этап

Соедините между собой стенку правую, царгу, основание и полку межсекционную

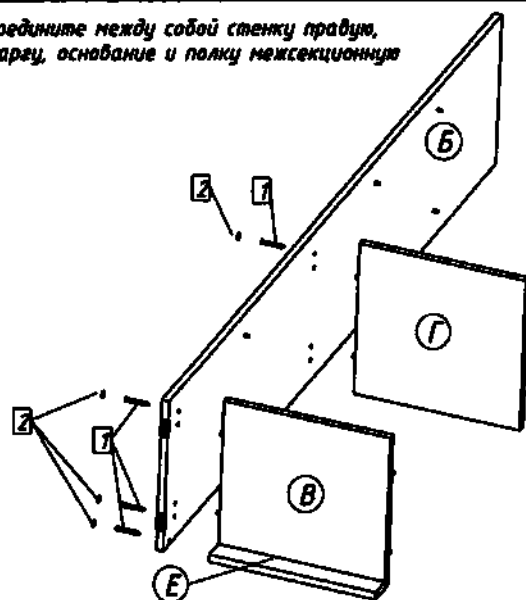

5x1 шт.

8x1 шт.

7x1 шт.


Ех1 шт.

1x5 шт.

2x5 шт.

Произведите сборку стенки левой

4 этап

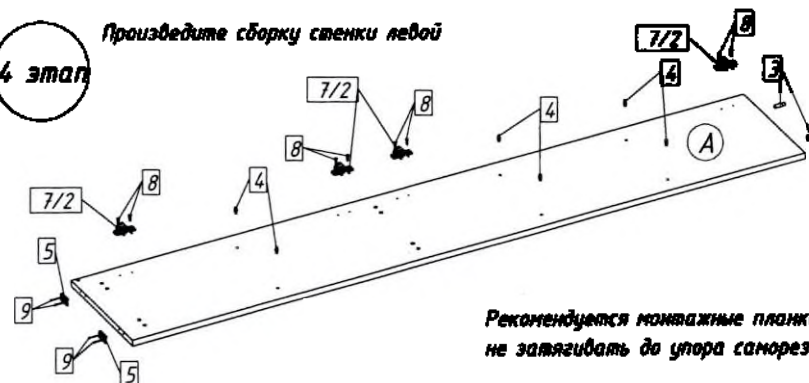

Ах1 шт.

3x2 шт.

4x6 шт.

5x2 шт.

7/2x4 шт.


8x8 шт.

9x4 шт.

Рекомендуется монтажные планки петлей 7/2 не затягивать до упора саморезами 8.

5 этап

Произведите установку стенки левой

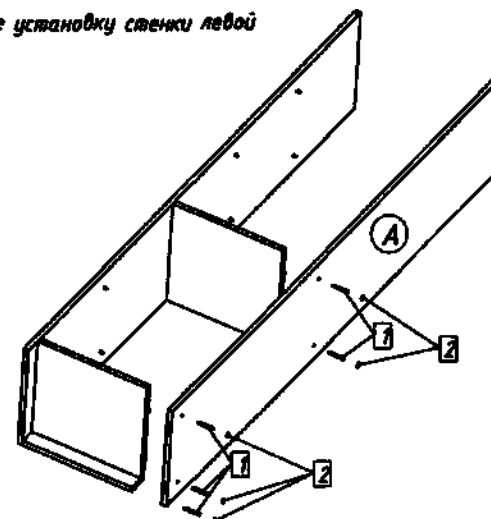


Ах1 шт.

1x5 шт.

2x5 шт.

6 этап

Произведите установку крышки


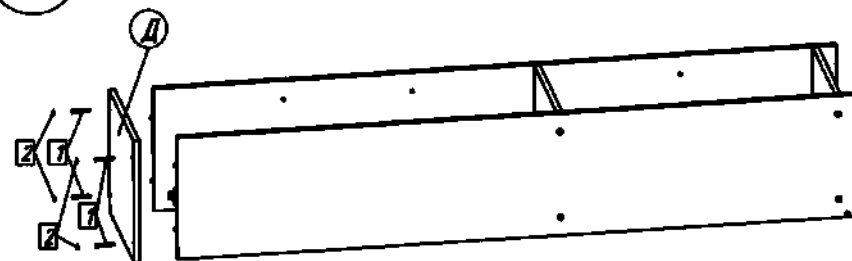


Дх1 шт.

1x4 шт.


2x4 шт.

Произведите фиксацию стенки задней с помощью гвоздей

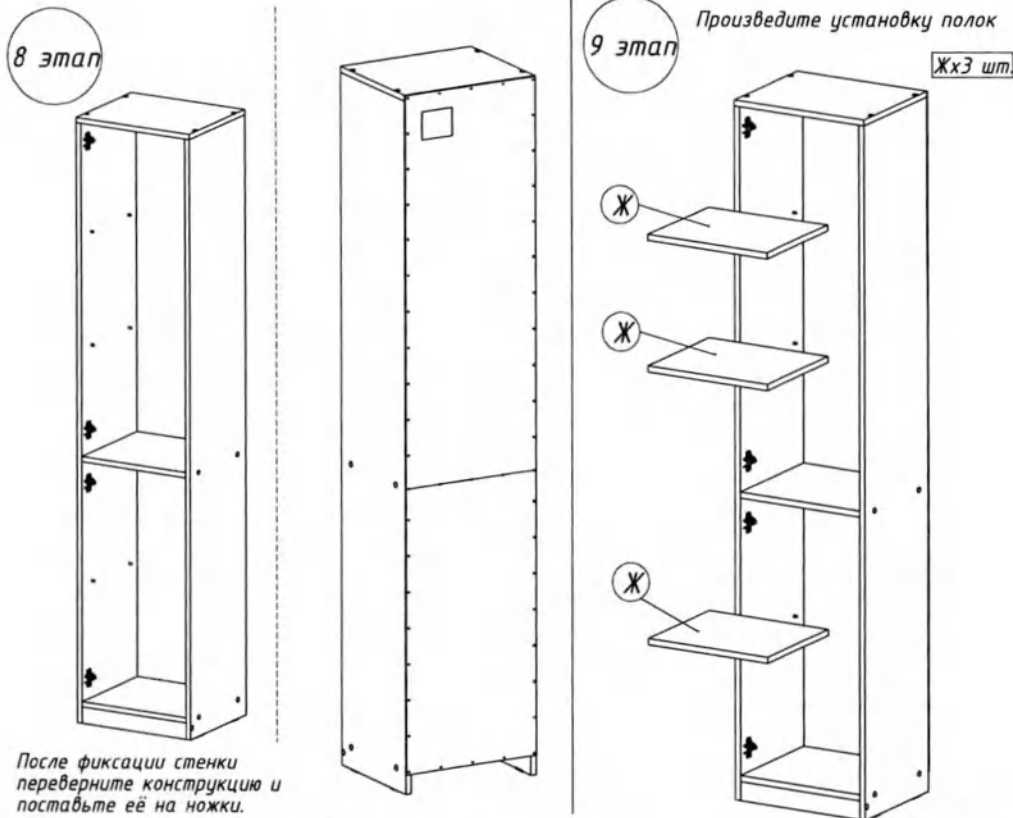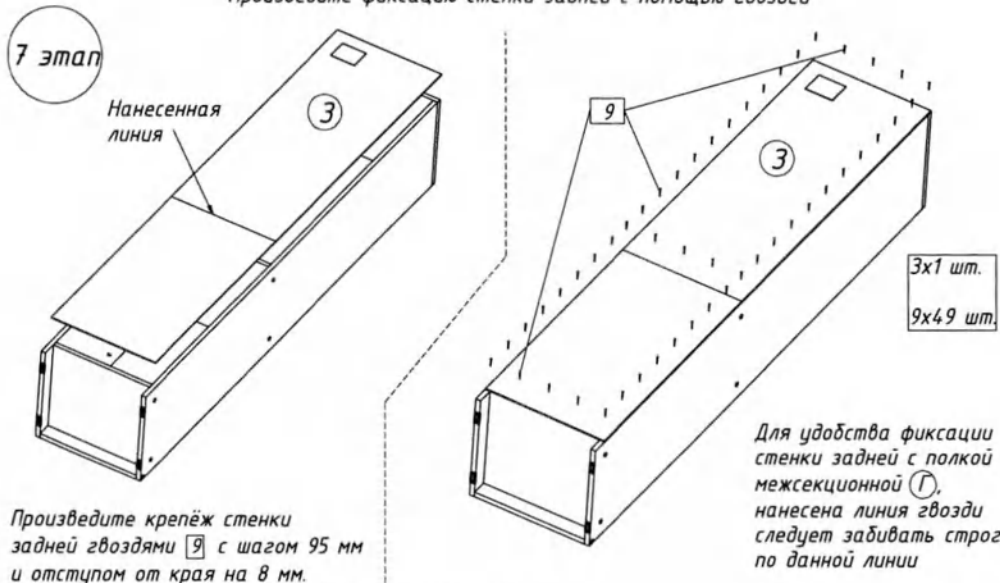


Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.6)

Произведите сборку дверей верхней и нижней

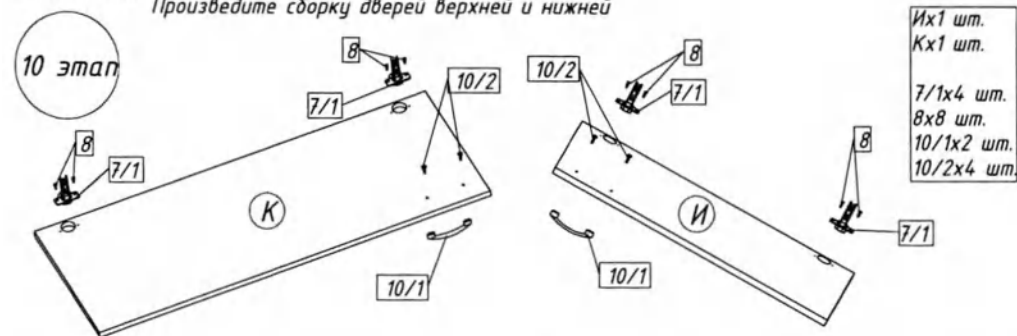


11 этап

Произведите установку дверей

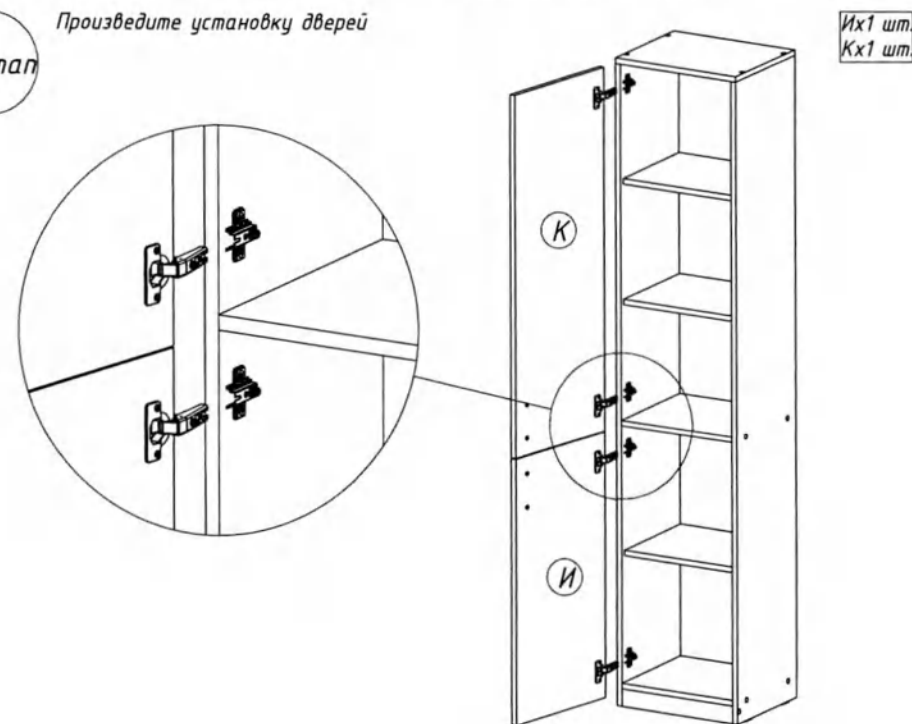

После установки двери произведите регулировку петель, с затяжкой всех винтов и саморезов


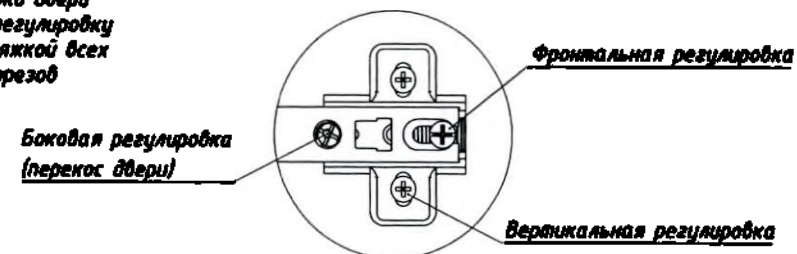


Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.6)


12 этап

После сборки изделия
наклейте самоклеющийся
логотип компании 6

6х1 шт.

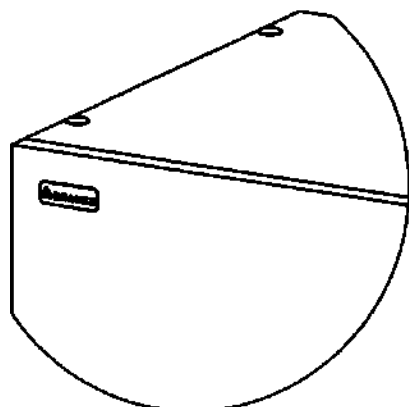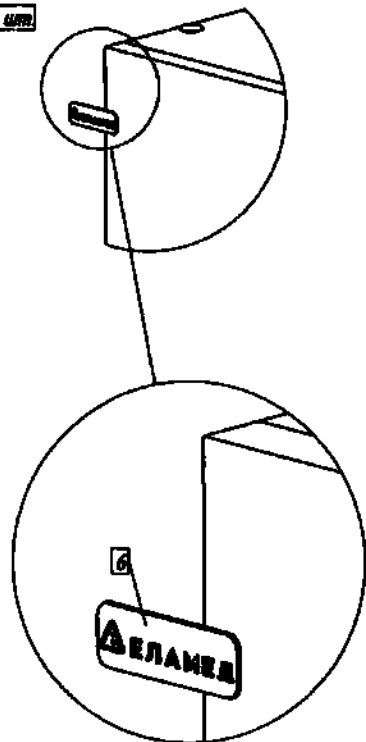


Сборка изделия завершена

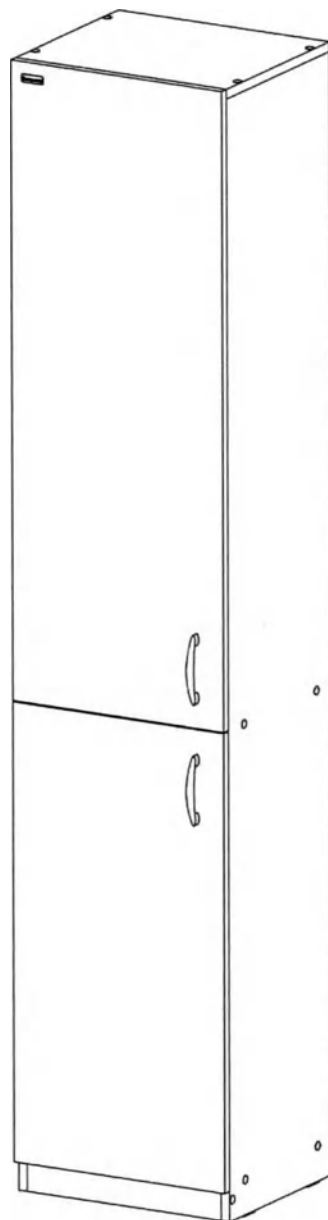

Инструкция по сборке изделия
Шкафы медицинские по ГИКС.942810.107 ТУ

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.7)

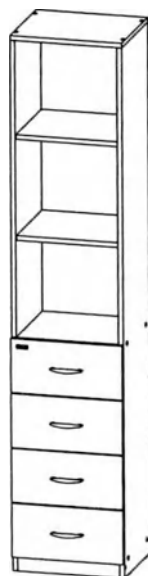

Условные обозначения:

1. А-Н : детали

2. [7] - [14] : крепёж и фурнитура

3. (1) - (17) : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Крышка	1
Г	Основание	1
Д	Полка межсекционная	1
Е	Полка верхняя	2
Ж	Царга	1
З	Стенка задняя	1
И	Стенка левая выдвижного ящика	4
К	Стенка правая выдвижного ящика	4
Л	Дно выдвижного ящика	4
М	Стенка задняя выдвижного ящика	4
Н	Фасад выдвижного ящика	4

Крепёж и фурнитура


Арт.	Кол - во	Обозначение	
[1*]	30	Конфирмат	
[2]	14	Заглушка конфирмата	
[3]	36	Шкант мебельный	
[4]	8	Полкодержатель	
[5]	4	Подпятник мебельный	
[6]	1	Логотип компании	
[7]	4 комплекта	Направляющие роликовые	
[8]	48	Саморез 3x12	
[9]	55	Гвоздь 1,6x25	
[10]	8	Эксцентрик	
[11]	8	Шток эксцентрика	
[12]	8	Заглушка эксцентрика	
[13]	4 комплекта	Ручка мебельная, винты с прессшайбой	
[14*]	1	Ключ шестигранный	

* Конфирматы [1] закручивать ключом шестигранным [14] заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

Схема сборки изделия


- 1 этап** Произведите сборку стенки правой
 Рекомендации по сборке: разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона и на них производите сборку изделия.

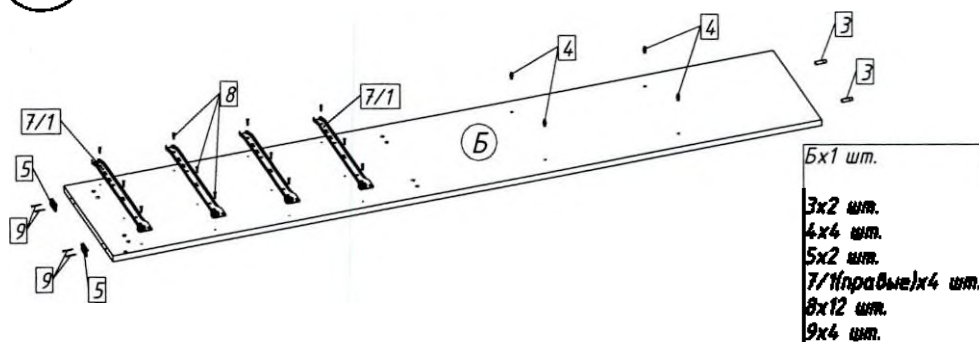


- 2 этап** Произведите сборку основания и полки межсекционной




- 3 этап** Соедините между собой стенку правую, царгу, основание и полку верхнюю

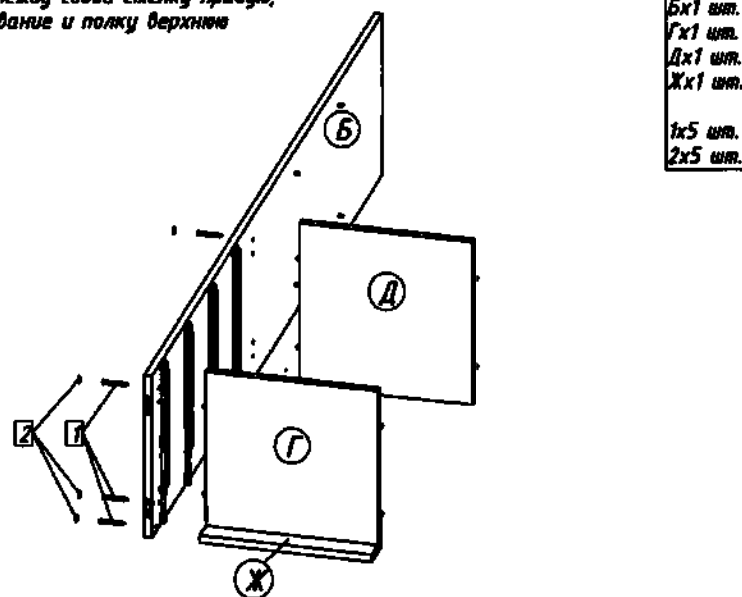


- 4 этап** Произведите сборку стенки левой





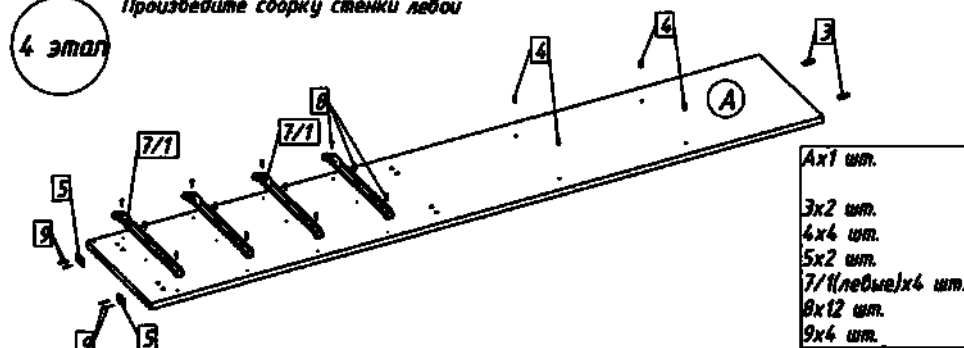


- 5 этап** Произведите установку стенки левой

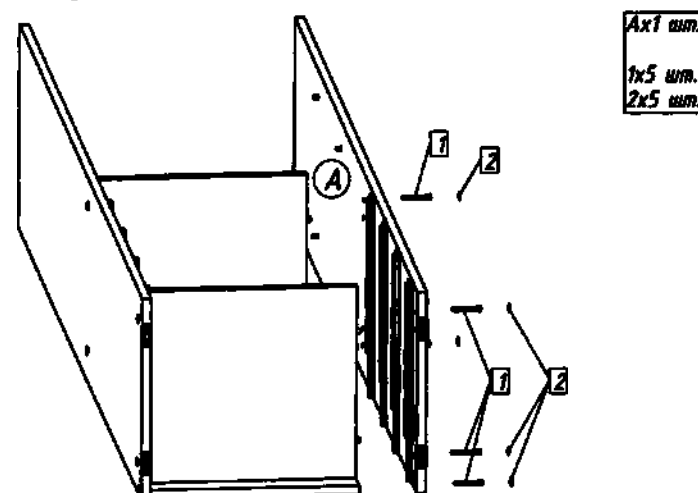


- 6 этап** Произведите установку крышки

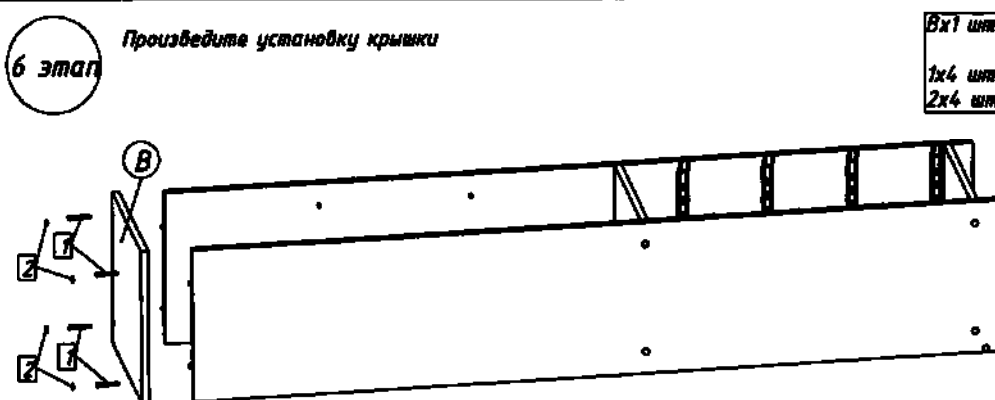

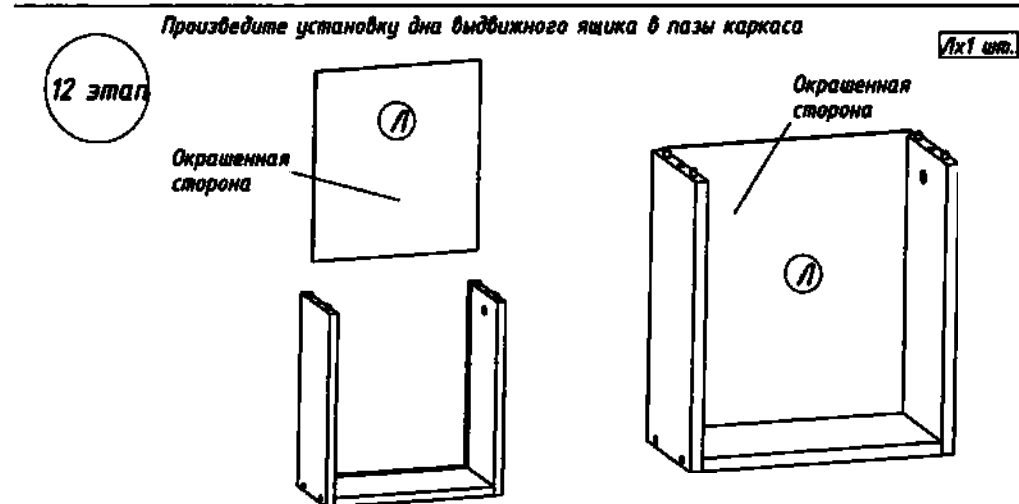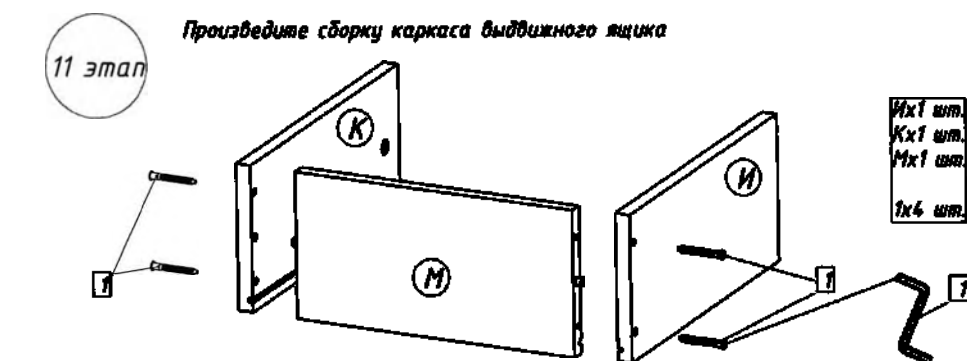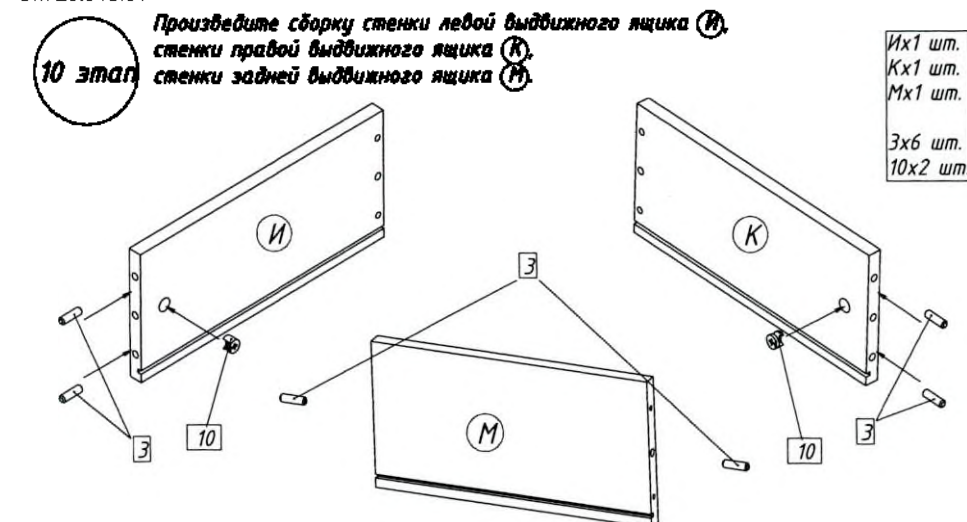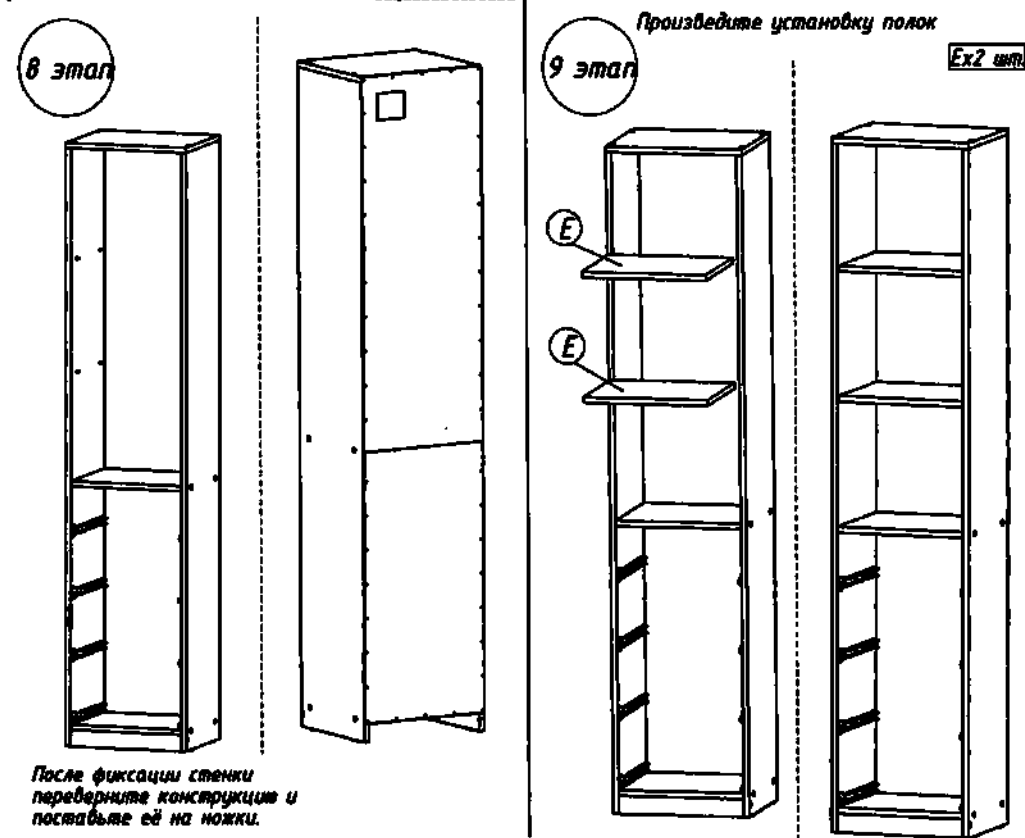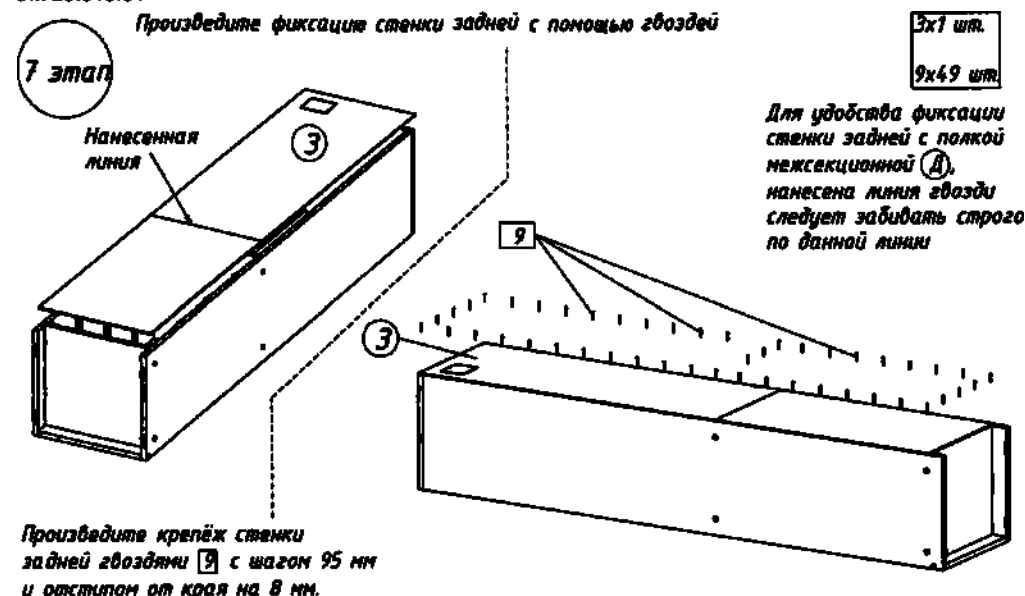


Произведите сборку фасада выдвижного ящика

13 этап

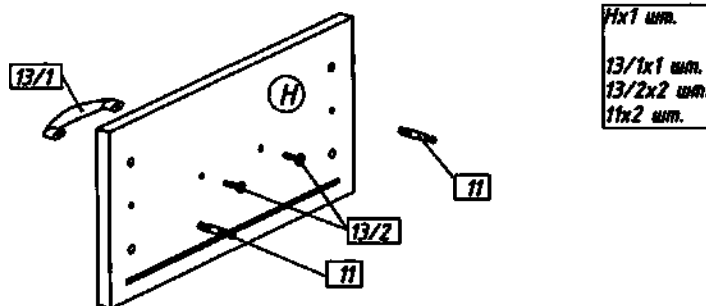


14 этап

Произведите установку фасада выдвижного ящика на каркас с дном

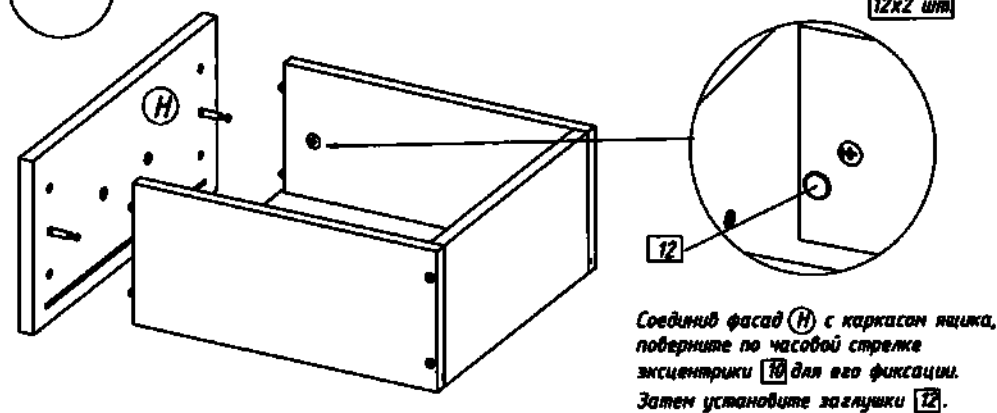

Произведите установку направляющих на выдвижной ящик


15 этап

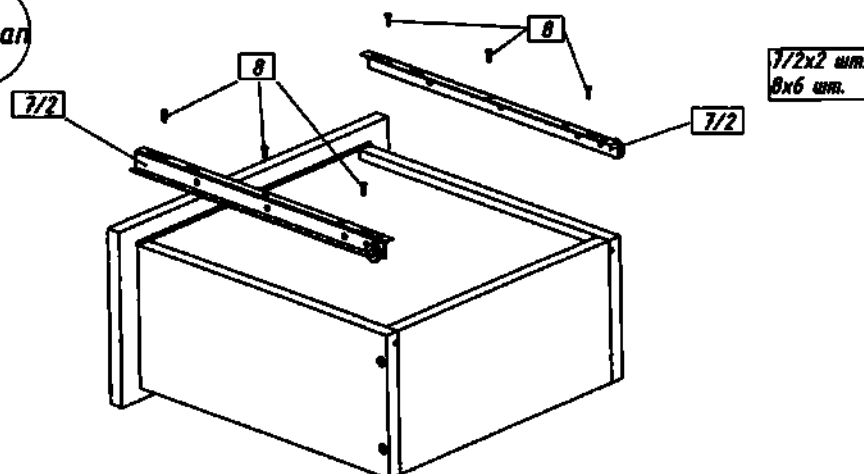

Повторите этапы (10) - (15), соберите 4 ящика

16 этап

Произведите установку ящиков



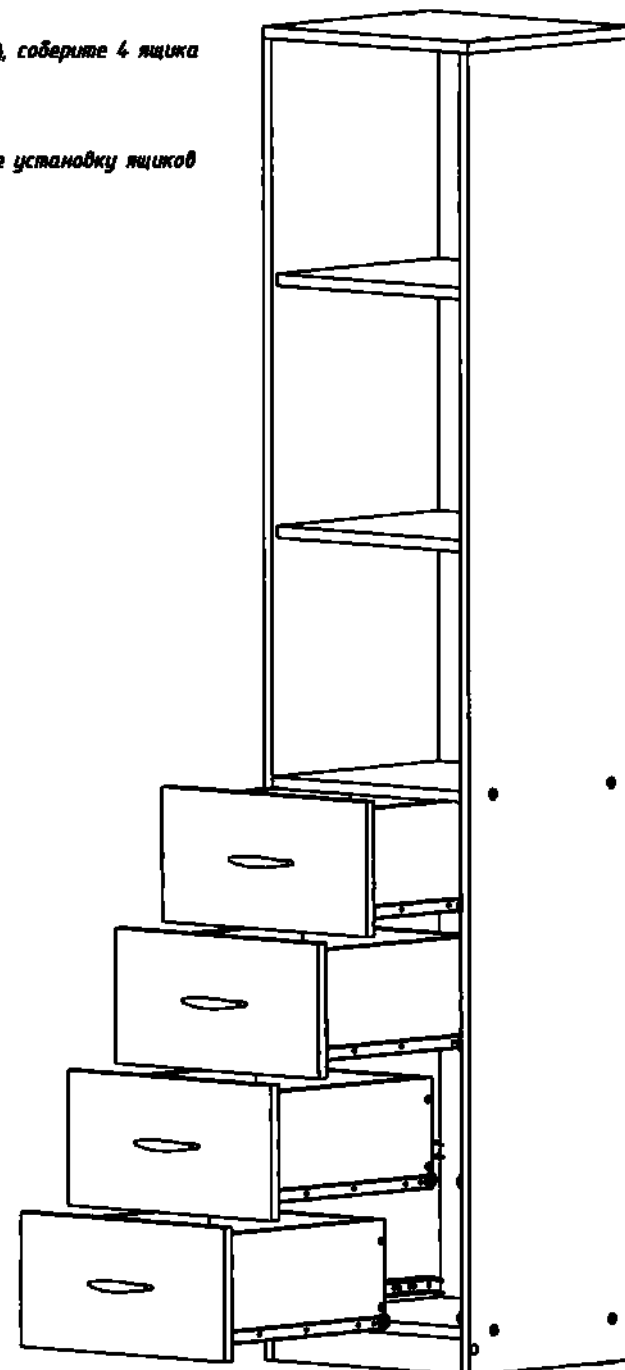


ОМ 29.518.01


17 этап

6х1 шт


После сборки изделия
наклейте самоклеящийся
логотип компании 6

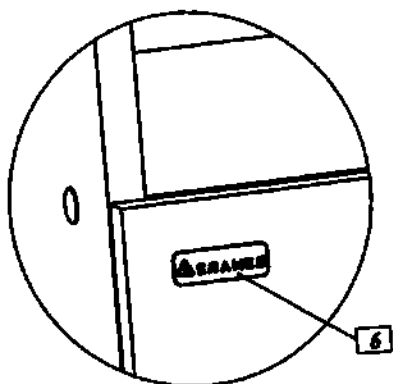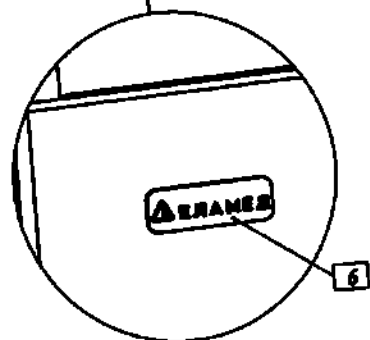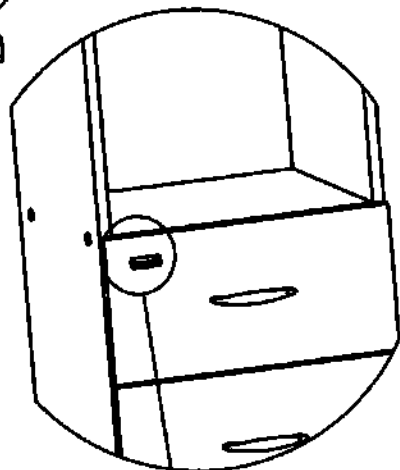

Сборка изделия завершена

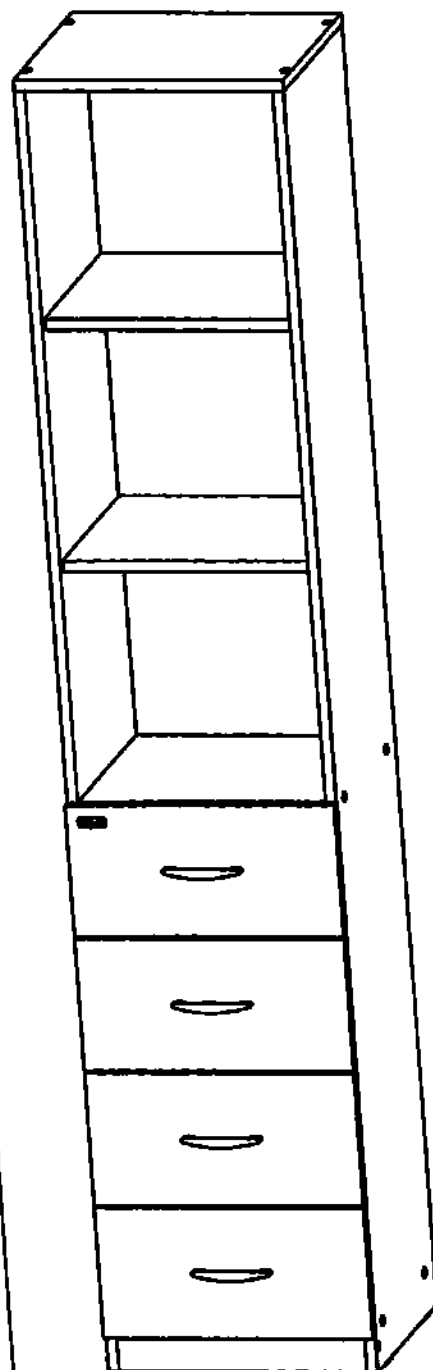

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.7)

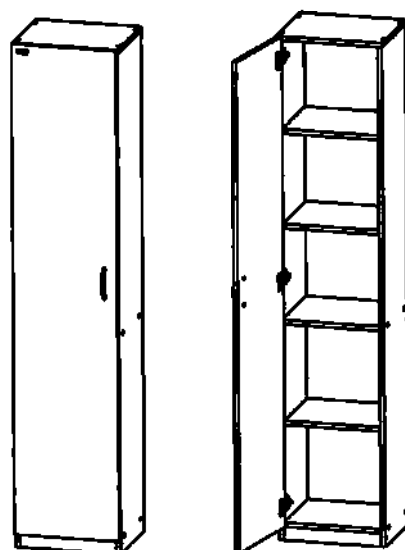

Условные обозначения:

1. А-И : детали

2. [7] - [11] : крепёж и фурнитура

3. ① - ⑫ : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Полка межсекционная	1
Д	Крышка	1
Е	Царга	1
Ж	Полка	3
З	Стенка задняя	1
И	Дверь	1

Арт.	Кол - во	Обозначение	
[1*]	16	Конфирмат	
[2]	16	Заглушка конфирмата	
[3]	12	Шкант мебельный	
[4]	12	Полкодержатель	
[5]	4	Подпятник мебельный	
[6]	1	Логотип компании	
[7]	3 комплекта	Петля накладная, монтажная планка	7/1 7/2
[8]	12	Саморез 4x16	
[9]	57	Гвоздь 1,6x25	
[10]	1 комплект	Ручка мебельная, винты с прессшайбой	10/1 10/2
[11*]	1	Ключ шестигранный	

* Конфирматы [7] закручивать ключом шестигранным [11] заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления


Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

Схема сборки изделия

1 этап

Произведите сборку стенки правой

Рекомендации по сборке: разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона и на них производите сборку изделия.

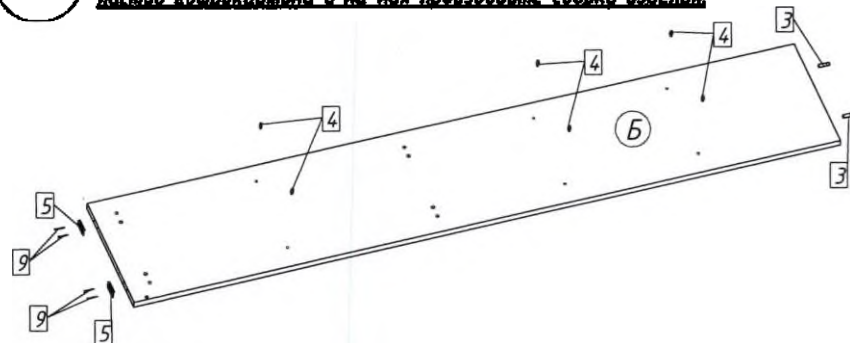

5x1 шт.

3x2 шт.


4x6 шт.

5x2 шт.

9x4 шт.

2 этап

Произведите сборку основания и полки межсекционной

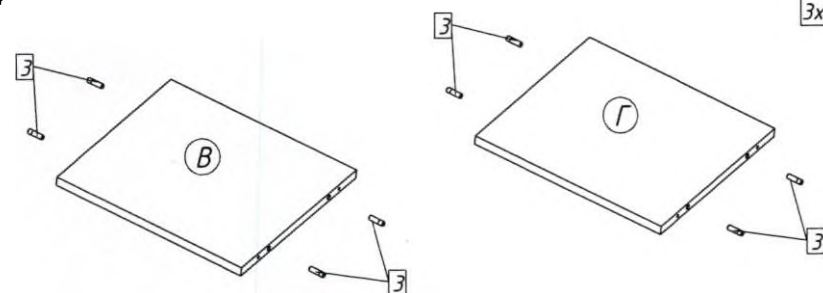


Bx1 шт.

Гx1 шт.

3x8 шт.

3 этап

Соедините между собой стенку правую, царгу, основание и полку межсекционную

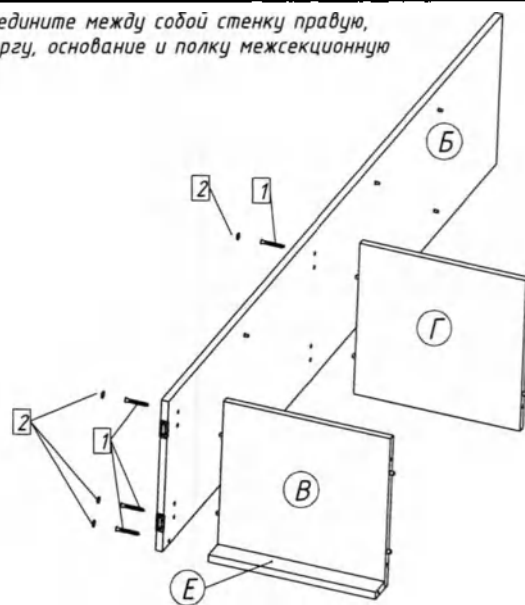

5x1 шт.

8x1 шт.

Гx1 шт.


Еx1 шт.

1x5 шт.

2x5 шт.

4 этап

Произведите сборку стенки левой

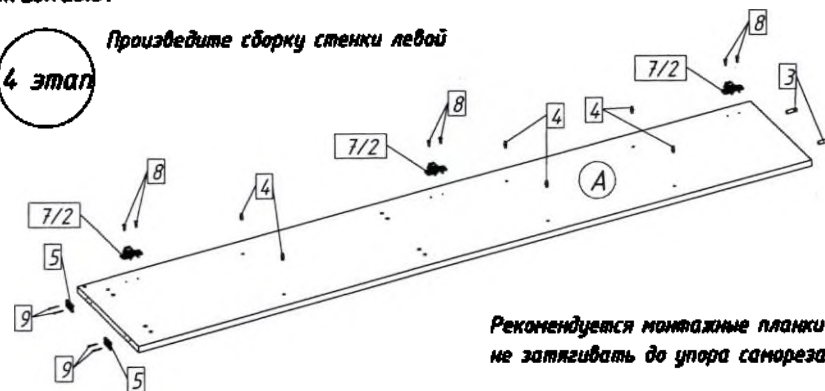

Ax1 шт.

3x2 шт.

4x6 шт.

5x2 шт.

7/2x3 шт.


8x6 шт.

9x4 шт.

Рекомендуется монтажные планки петлей 7/2 не затягивать до упора саморезами 8.

5 этап

Произведите установку стенки левой

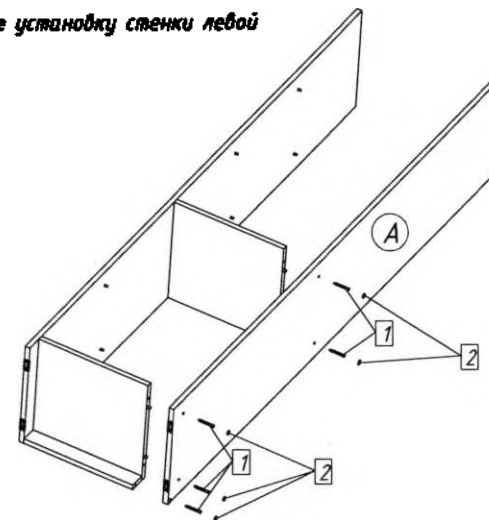


Ax1 шт.

1x5 шт.

2x5 шт.

6 этап

Произведите установку крышки

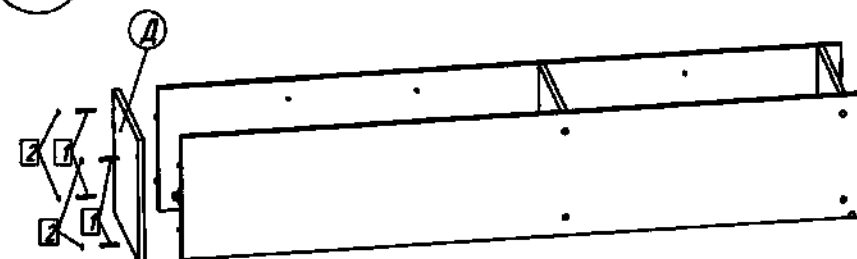

Ax1 шт.



1x4 шт.

2x4 шт.

Произведите фиксацию стенки задней с помощью гвоздей

7 этап


Нанесенная линия

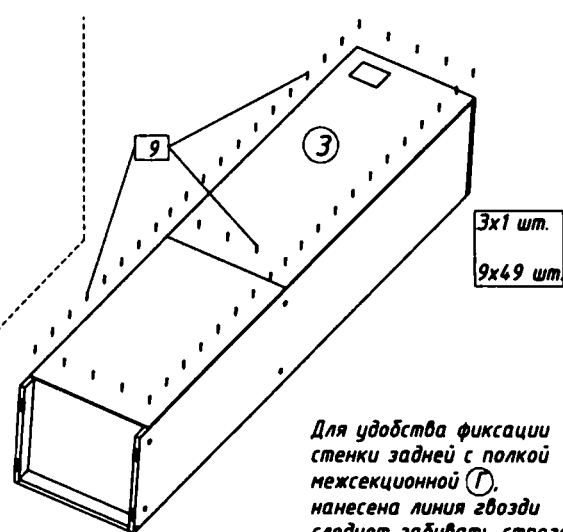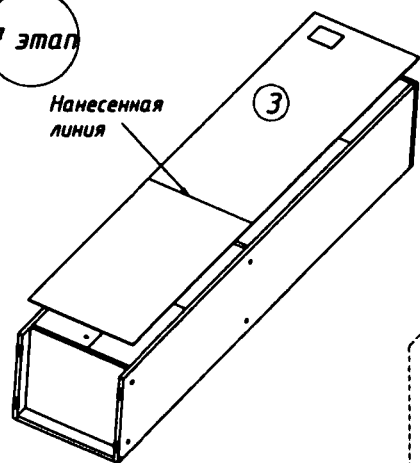


Произведите крепёж стенки задней гвоздями 9 с шагом 95 мм и отступом от края на 8 мм.

Для удобства фиксации стенки задней с полкой межсекционной 1, нанесена линия гвозди следует забивать строго по данной линии

8 этап

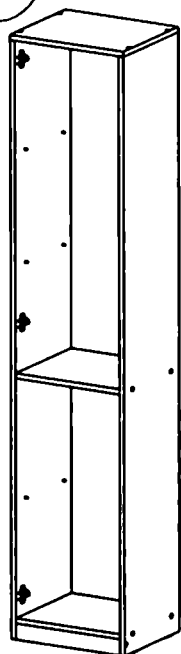


После фиксации стенки переверните конструкцию и поставьте её на ножки.

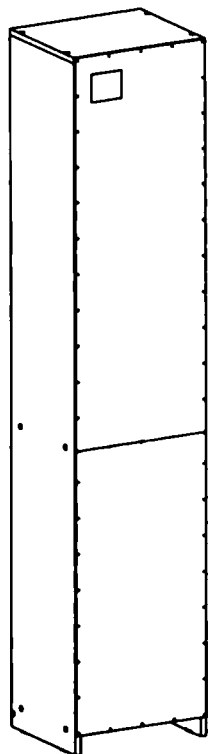

9 этап

Произведите установку полок

Жх3 шт.

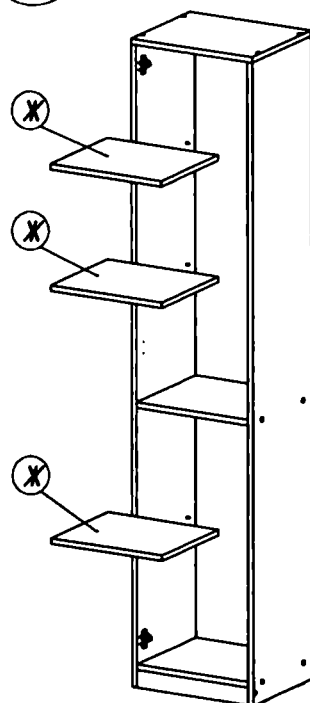


Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.8)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Произведите сборку двери



10 этап

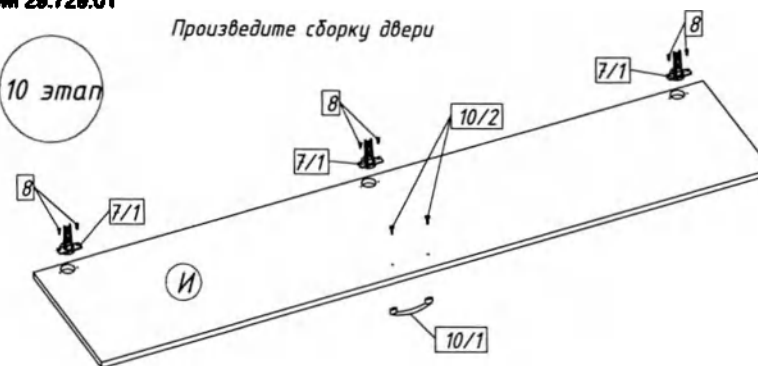

Произведите установку двери

11x1 шт.

11 этап

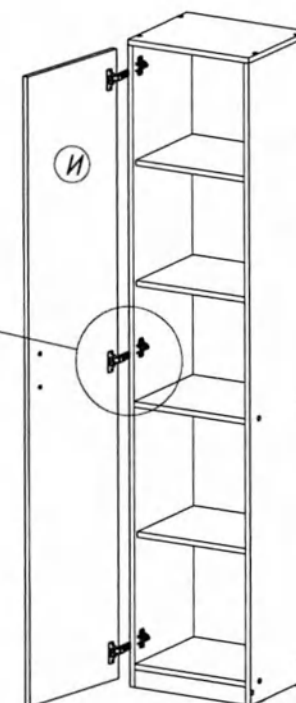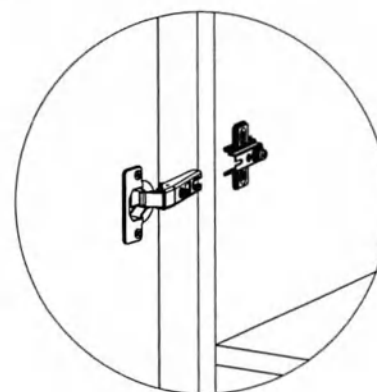

После установки двери произведите регулировку петель, с затяжкой всех винтов и саморезов

Боковая регулировка (перекос двери)

Фронтальная регулировка




Вертикальная регулировка

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.8)


12 этап

После сборки изделия
наклейте самоклеющийся
логотип компании 6

6х1 шт

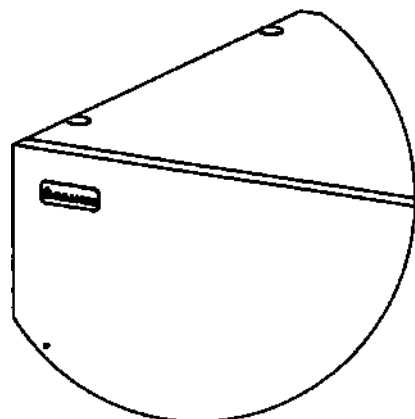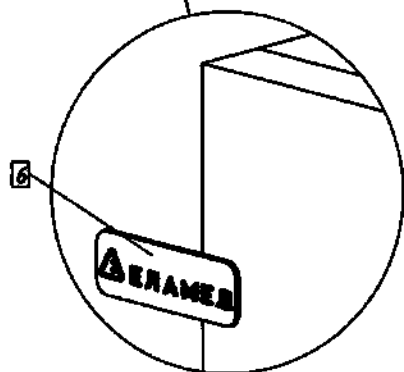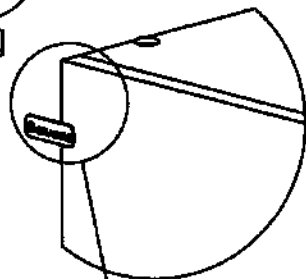


Сборка изделия завершена

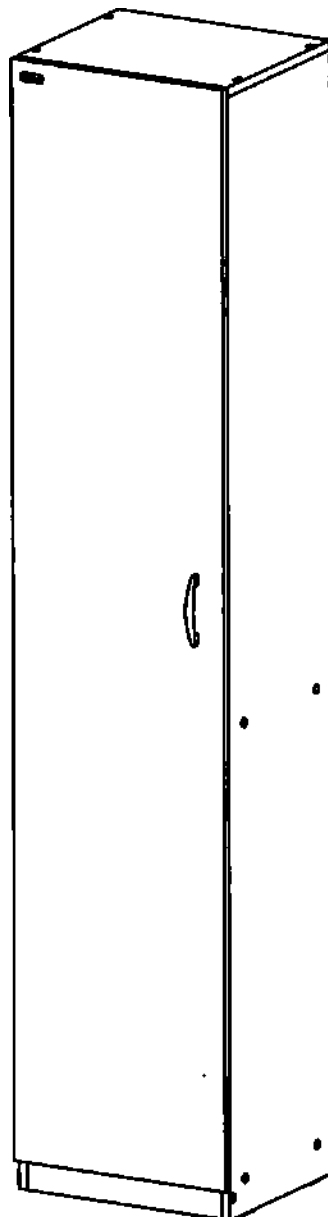

Инструкция по сборке изделия
Шкафы медицинские по ГИКС.942810.107 ТУ

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.9)

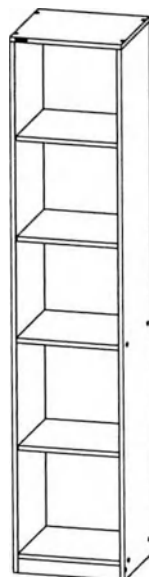

Условные обозначения:

1. А-З : детали

2. [1] - [8] : крепёж и фурнитура

3. (1) - (10) : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Полка межсекционная	1
Д	Крышка	1
Е	Царга	1
Ж	Полка	3
З	Стенка задняя	1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
[1*]	14	Конфирмат	
[2]	14	Заглушка конфирмата	
[3]	12	Шкант мебельный	
[4]	12	Полкодержатель	
[5]	4	Подпятник мебельный	
[6]	1	Логотип компании	
[7]	57	Гвоздь 1,6x25	
[8*]	1	Ключ шестигранный	

* Конфирматы [7] закручивать ключом шестигранным [8] заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления


Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

Схема сборки изделия

1 этап

Произведите сборку стенки правой

Рекомендации по сборке: положите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона и на них производите сборку изделия.

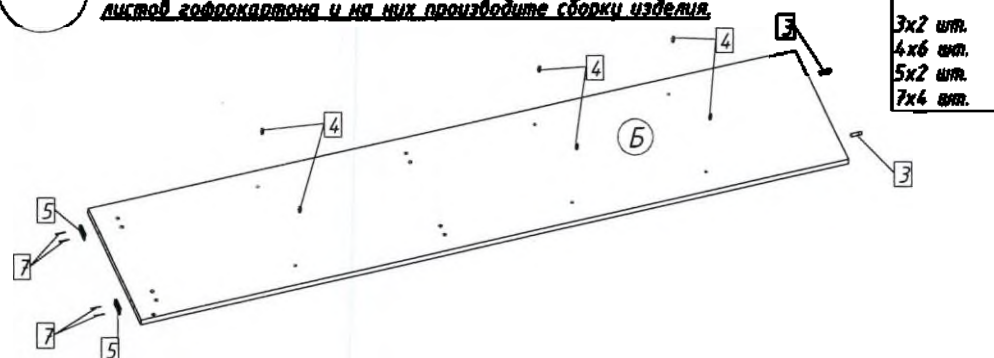

5x1 шт.

3x2 шт.


4x6 шт.

5x2 шт.

7x4 шт.

2 этап

Произведите сборку основания и полки межсекционной

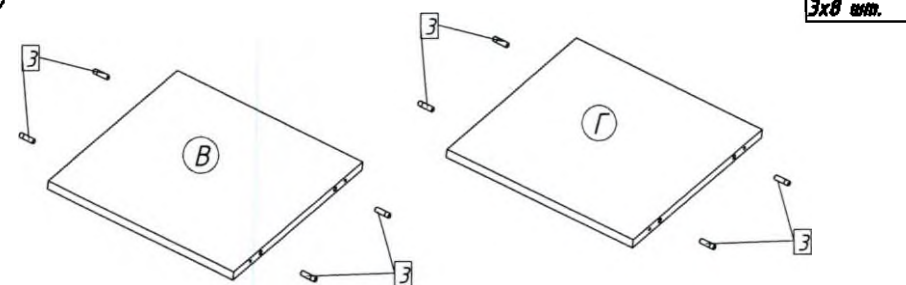


8x1 шт.

Гx1 шт.

3x8 шт.

3 этап

Соедините между собой стенку правую, царгу, основание и полку межсекционную

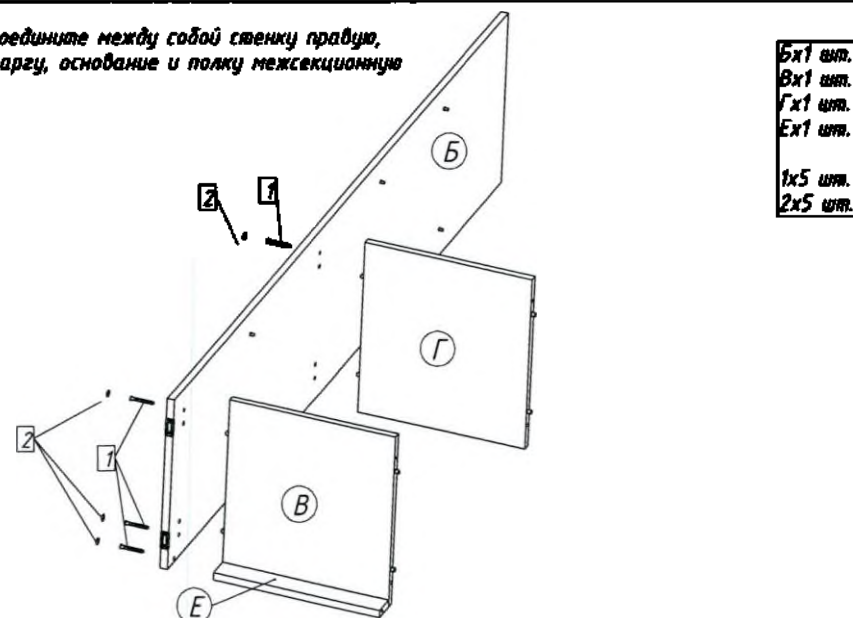

5x1 шт.

8x1 шт.

Гx1 шт.


Еx1 шт.

1x5 шт.

2x5 шт.

Произведите сборку стенки левой

4 этап

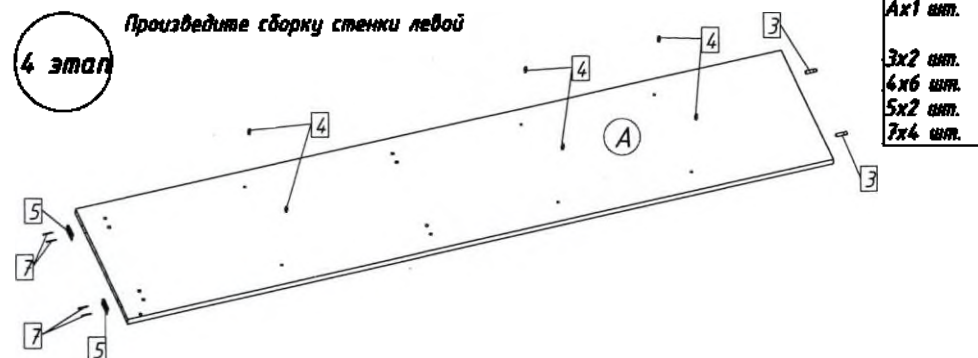

4x1 шт.

3x2 шт.


4x6 шт.

5x2 шт.

7x4 шт.

5 этап

Произведите установку стенки левой

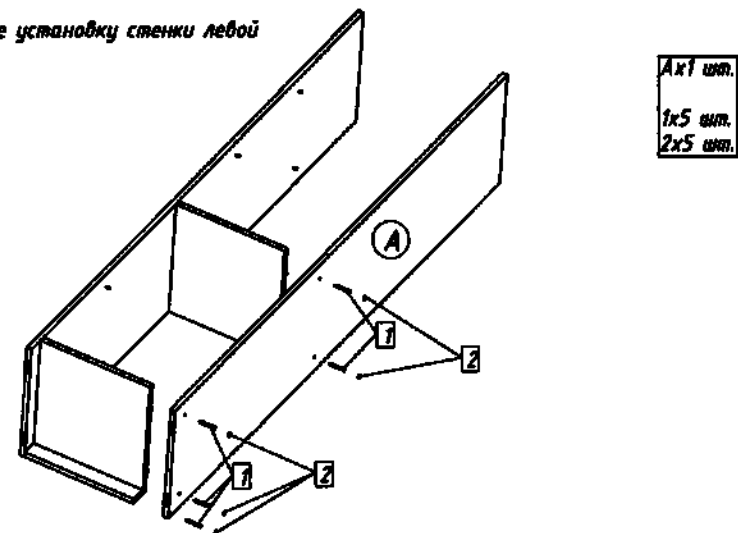


4x1 шт.

1x5 шт.

2x5 шт.

6 этап

Произведите установку крышки

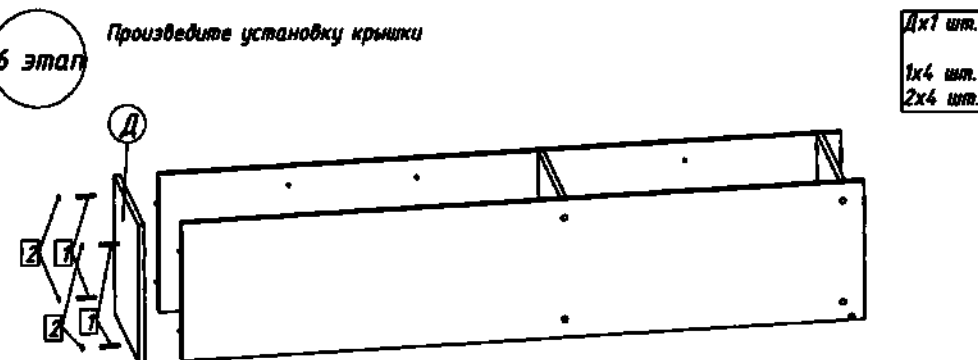

4x1 шт.

1x4 шт.



2x4 шт.

ОМ 29.731.01

Произведите фиксацию стенки задней с помощью гвоздей

7 этап

Нанесенная линия

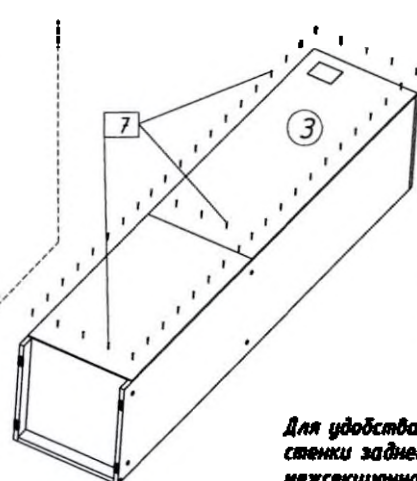
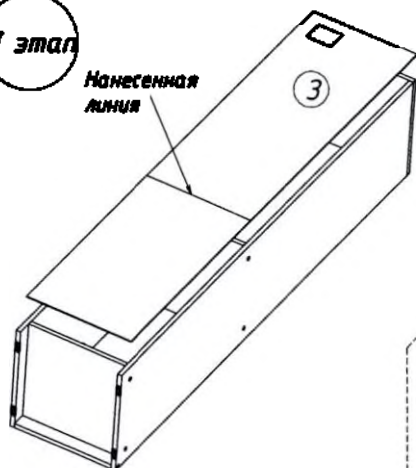


3x1 шт.
7x49 шт.

Для удобства фиксации
стенки задней с полкой
нежсекционной ①,
нанесена линия гвозди
следует забивать строго
по данной линии

Произведите крепёж стенки
задней гвоздями ⑦ с шагом 95 мм
и отступом от края на 8 мм.

8 этап

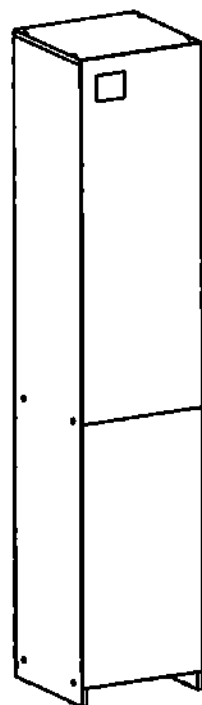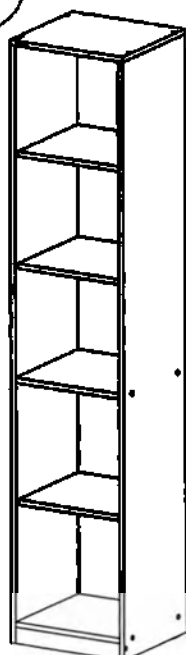

После фиксации стенки
переверните конструкцию и
поставьте её на ножки.


Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.9)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9 этап

Произведите установку полок

ЖхЗ шт



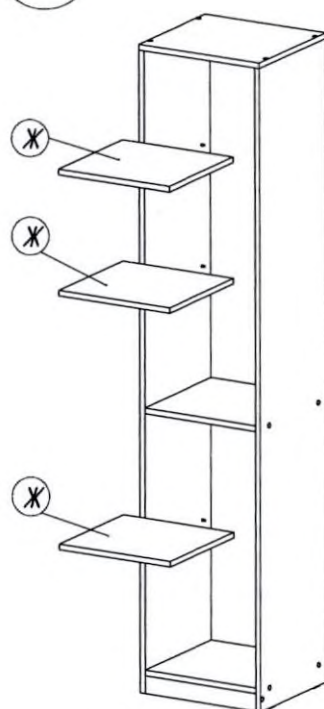


ОМ 29.731.01


После сборки изделия
наклейте самоклеющийся
логотип компании ⑥


10 этап

6x1 шт.

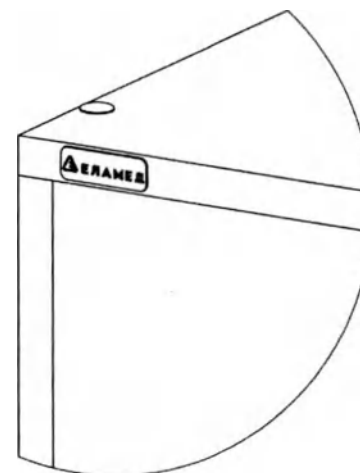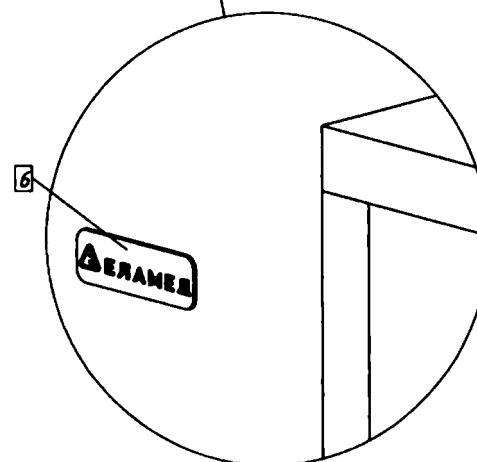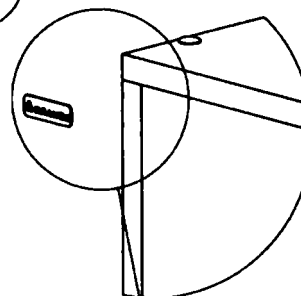

Сборка изделия завершена

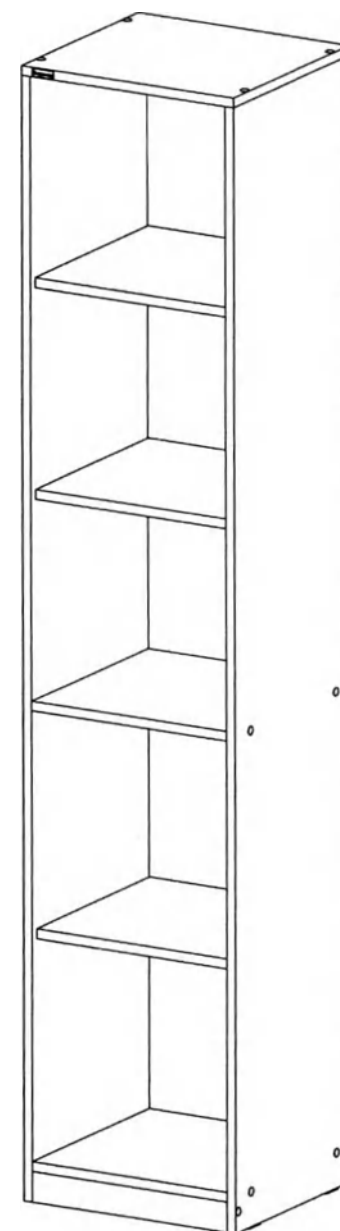

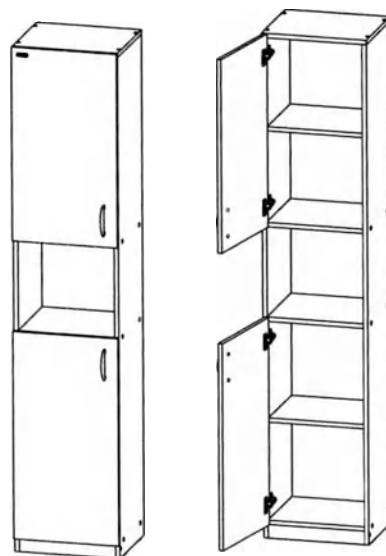

Условные обозначения:

1. А-К : детали

2. [7] - [11] : крепёж и фурнитура

3. (1) - (12) : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Полка межсекционная	2
Д	Крышка	1
Е	Царга	1
Ж	Полка	2
З	Стенка задняя	1
И	Дверь нижняя	1
К	Дверь верхняя	1

Арт.	Кол - во	Обозначение	
[1*]	18	Конфирмат	
[2]	18	Заглушка конфирмата	
[3]	16	Шкант мебельный	
[4]	8	Полкодержатель	
[5]	4	Подпятник мебельный	
[6]	1	Логотип компании	
[7]	4 комплекта	Петля накладная, монтажная планка	7/1 7/2
[8]	16	Саморез 4x16	
[9]	60	Гвоздь 1,6x25	
[10]	2 комплекта	Ручка мебельная, винты с прессшайбой	10/1 10/2
[11*]	1	Ключ шестигранный	

* Конфирматы [1] закручивать ключом шестигранным [11] заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления


Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

Схема сборки изделия

1 этап


Произведите сборку стенки правой

Рекомендации по сборке: разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона и на них производите сборку изделия.

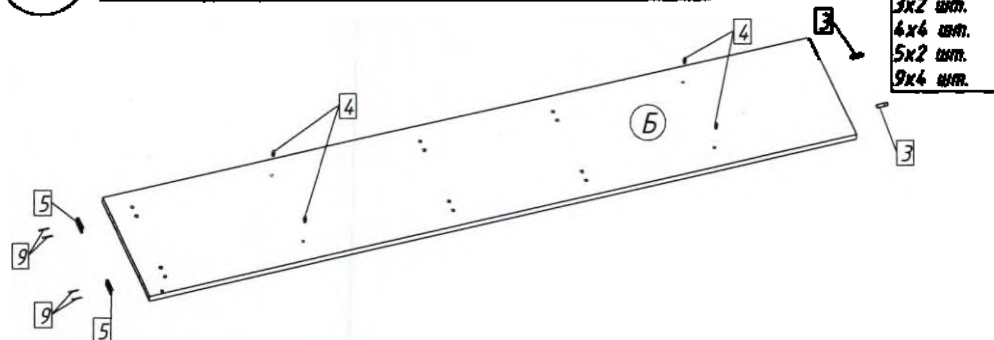


2 этап

Произведите сборку основания и 2-х полок межсекционных

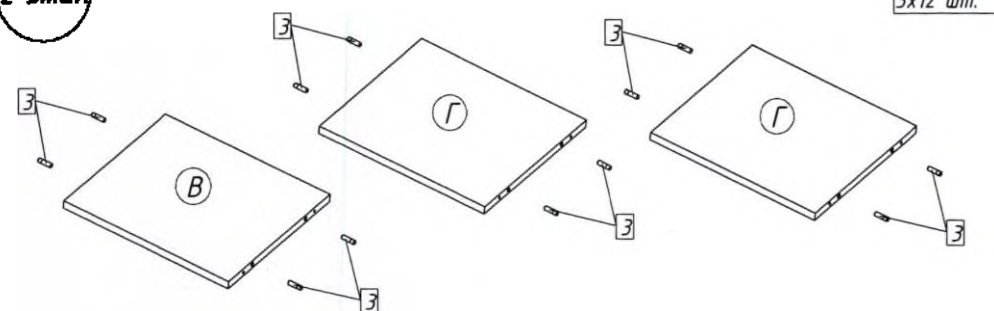


3 этап

Соедините между собой стенку правую, царгу, основание и полки межсекционные

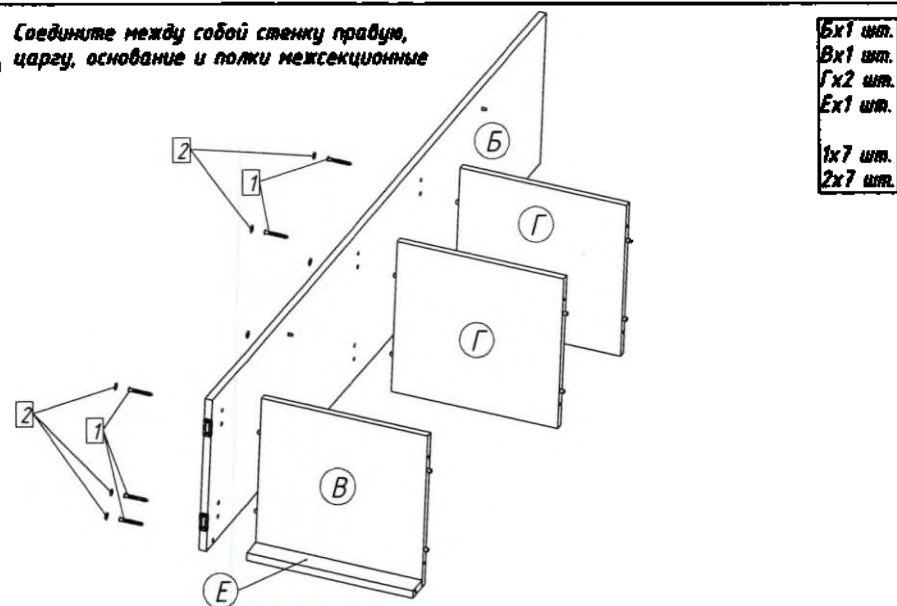


Произведите сборку стенки левой

4 этап

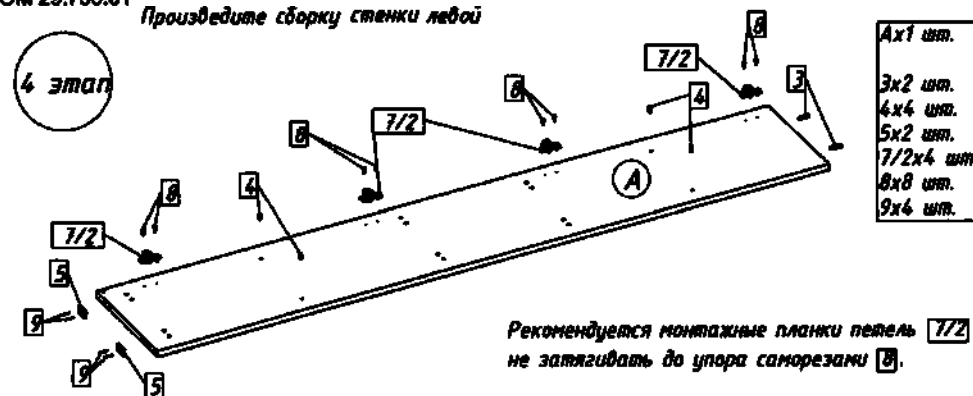


5 этап

Произведите установку стенки левой

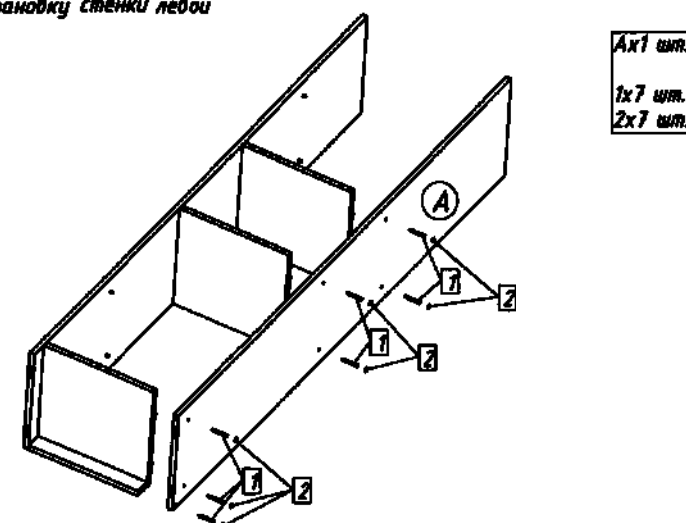


6 этап

Произведите установку крышки

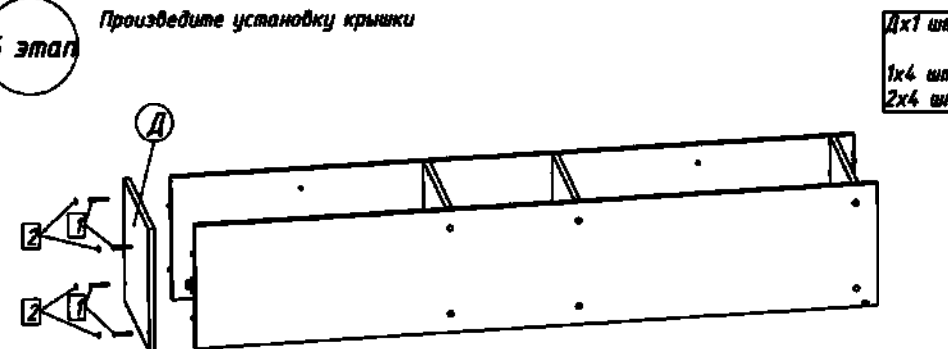


Произведите фиксацию стенки задней с помощью гвоздей

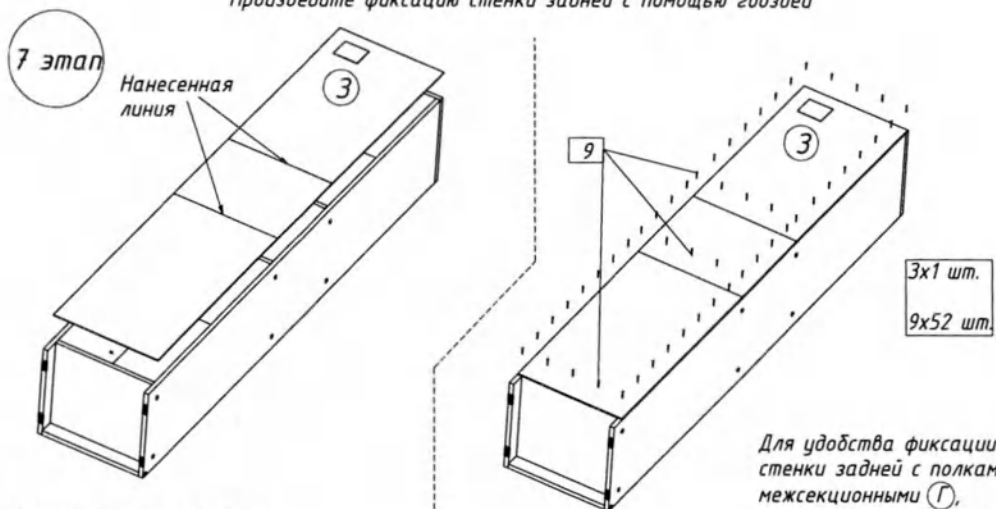

Произведите крепёж стенки задней гвоздями 9 с шагом 95 мм и отступом от края на 8 мм.

Для удобства фиксации стенки задней с полками межсекционными Г, нанесена линия гвозди следует забивать строго по данной линии


8 этап

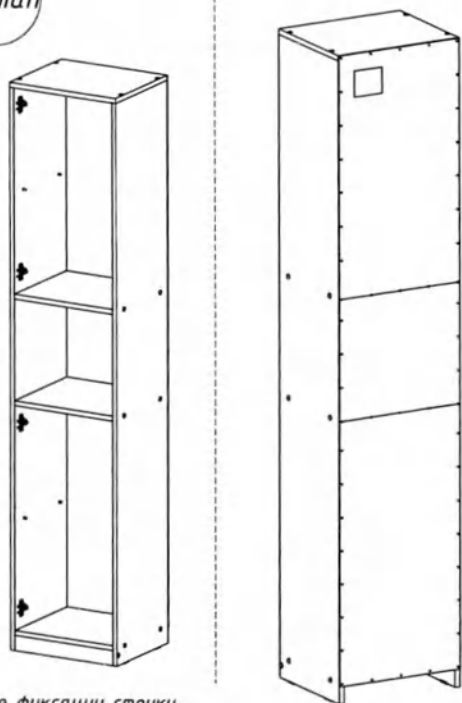

После фиксации стенки переверните конструкцию и поставьте её на ножки.


Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.10)

Произведите сборку дверей верхней и нижней

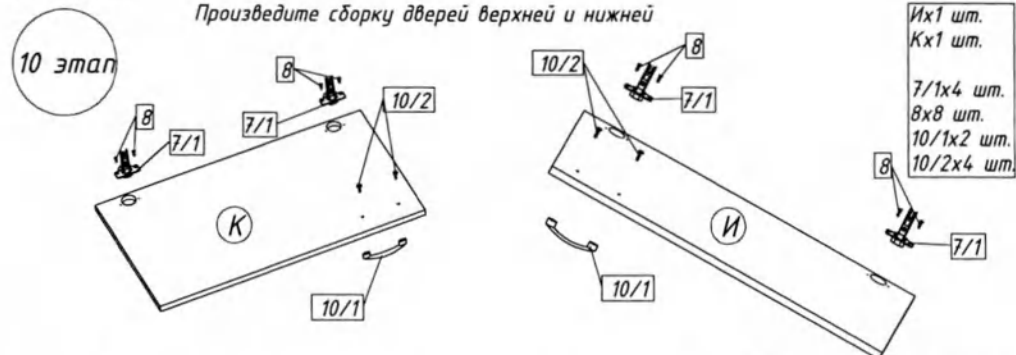

Произведите установку дверей

11 этап

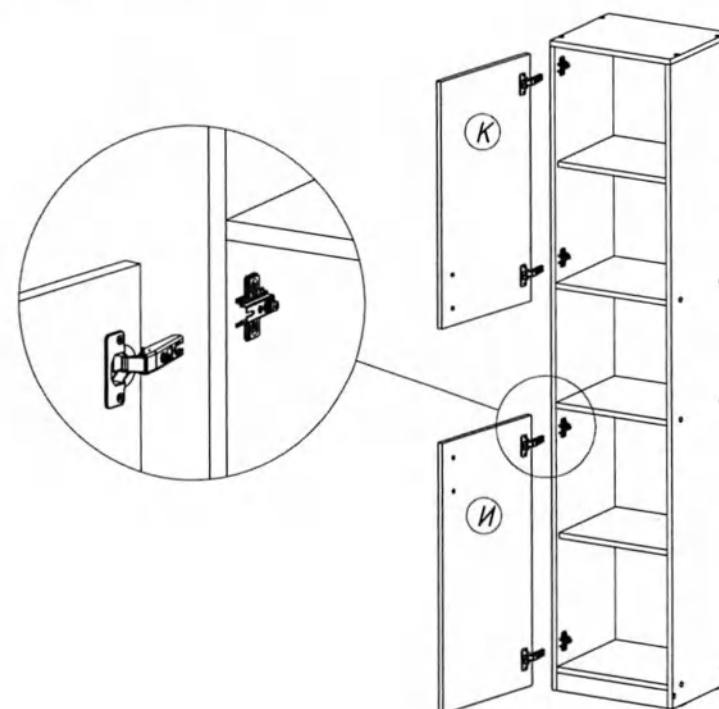

После установки двери произведите регулировку петель, с затяжкой всех винтов и саморезов

Боковая регулировка (перекос двери)

Фронтальная регулировка




Вертикальная регулировка

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.10)


12 этап

После сборки изделия
наклейте самоклеющийся
логотип компании 6

6 шт.

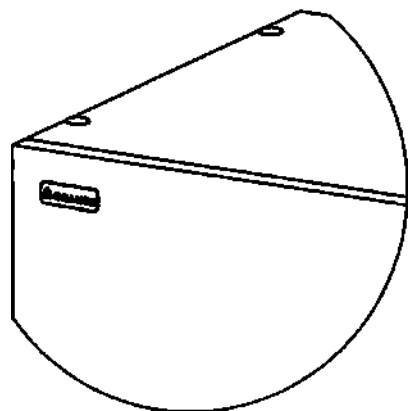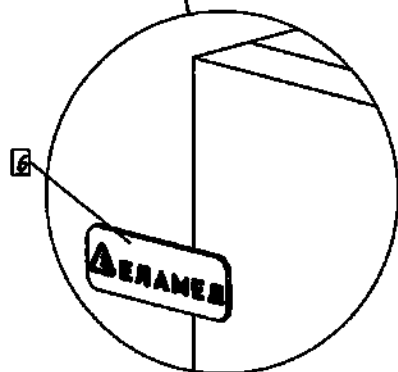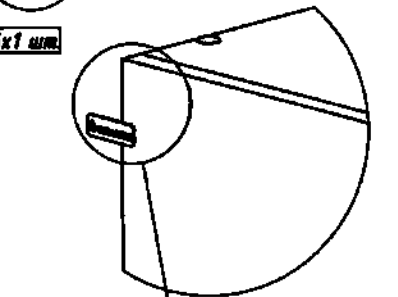

Сборка изделия завершена

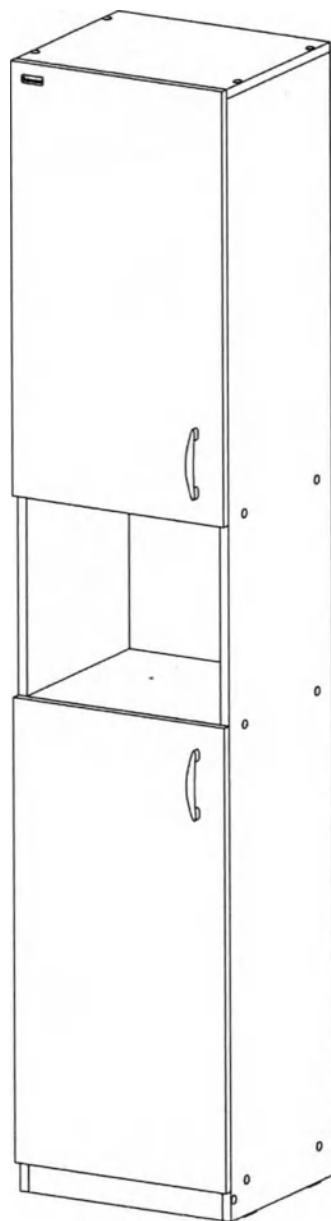


Инструкция по сборке изделия
Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ
Шкаф медицинский для хранения медицинских
изделий (мод.15)

Условные обозначения:

1. А-И : детали

2. [7] - [17] : крепеж и фурнитура

3. ① - ⑪ : этапы сборки

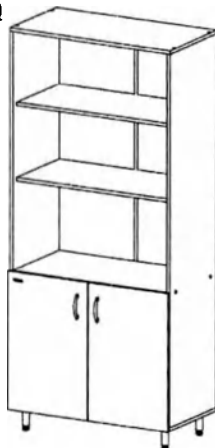

Код 15392

Детали

№	Наименование	Кол - во
А	Основа	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Крышка	1
Д	Стенка задняя	2
Е	Полка межсекционная	1
Ж	Полка	3
З	Дверь левая	1
И	Дверь правая	1

1

Крепёж и фурнитура


Арт.	Кол - во	Обозначение	
[7]	12	Евровинт	
[2]	8	Заглушка евровинта	
[9]	12	Шкант мебельный	
[4]	4	Опора	
[5]	16	Винт М4х25	
[6]	16	Гайка 4	
[7]	16	Шайба 4	
[8]	52	Гвоздь 1,6х25	
[9]	4	Петля 4-х шарнирная 90/110	
[10]	16	Саморез 4х16	
[11]	2	Ручка мебельная	
[12]	4	Винт с прессшайбой М4х20	
[13]	12	Полкодержатель	
[14]	1	Брус соединительный 1102 мм	
[15]	1	Брус соединительный 606 мм	
[16]	1	Ключ шестигранный 4 мм	
[17]	1	Поворотник комплект	

2

Схема сборки изделия**1 этап**


Произведите сборку стенки левой

5х1 шт.
3х4 шт.
13х6 шт.
10х4 шт.
9/1х2 шт.

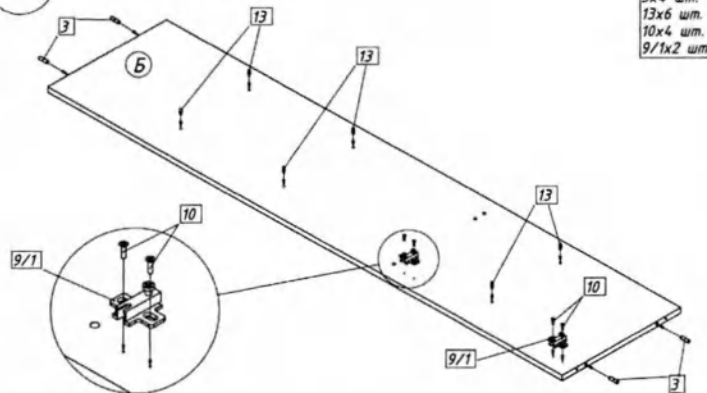
**2 этап**

Произведите сборку стенки правой

5х1 шт.
3х4 шт.
13х6 шт.
10х4 шт.
9/1х2 шт.

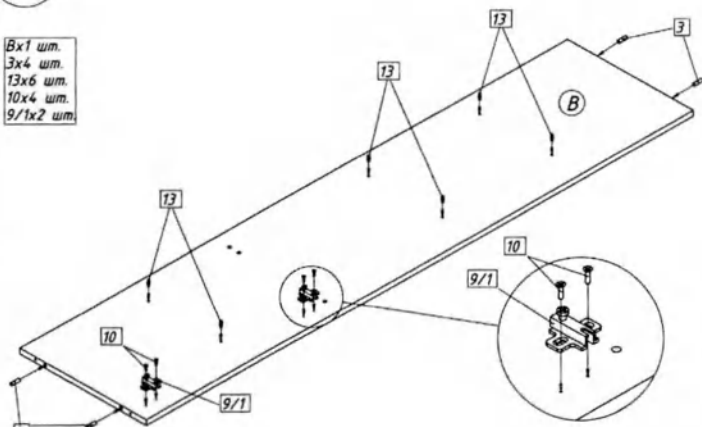


Произведите сборку двери левой

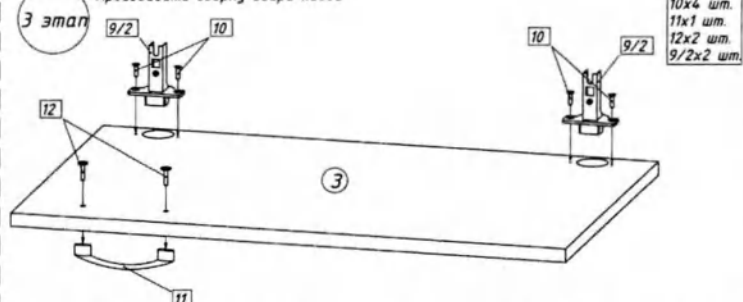3 этап


3х1 шт.
10х4 шт.
11х1 шт.
12х2 шт.
9/2х2 шт.

Произведите сборку двери правой

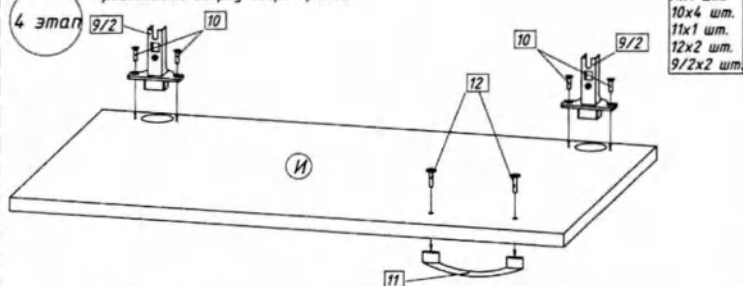4 этап

1х1 шт.
10х4 шт.
11х1 шт.
12х2 шт.
9/2х2 шт.

Произведите сборку каркаса

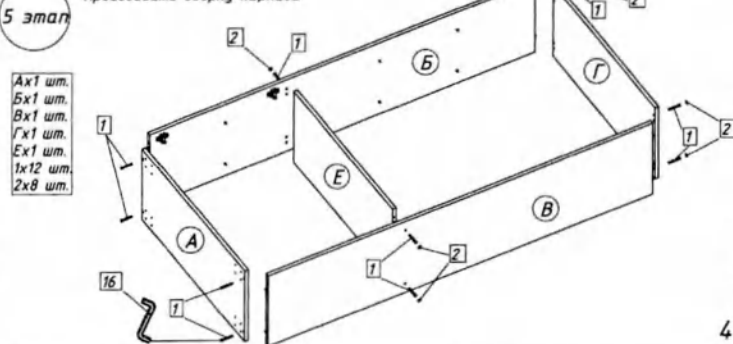5 этап

4х1 шт.
5х1 шт.
6х1 шт.
7х1 шт.
8х1 шт.
1х12 шт.
2х8 шт.


3

4

Произведите установку опор

6 этап

4x4 мм
5x16 мм
6x16 мм
7x16 мм

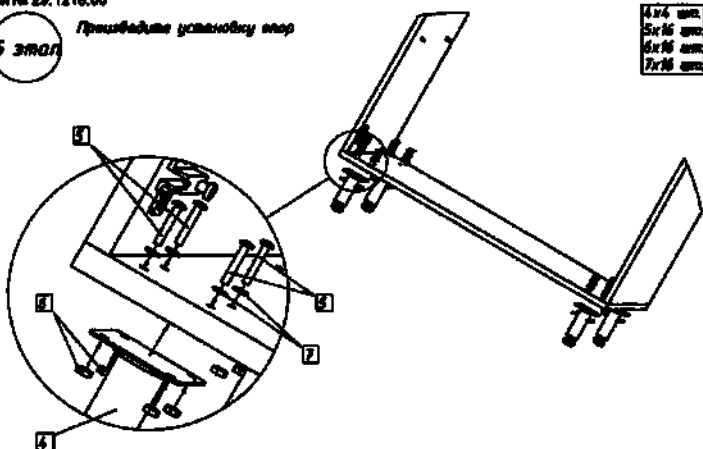

Произведите крепление стенок задних ящиков

8 этап

Ø10, Ø2 мм


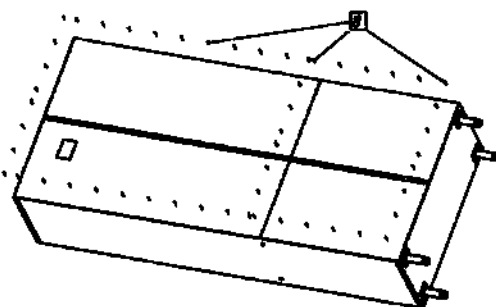


Схема расположения ящиков

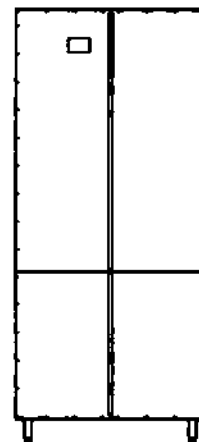


Для удобства фиксации стенок задних с полкой неэкспозиционной, нанесена линия, ящики следует заводить строго по данной линии.

7 этап

Произведите установку стенок задних, предварительно установив 2 бруса соединительных



4x2 мм
14x1 мм
15x1 мм

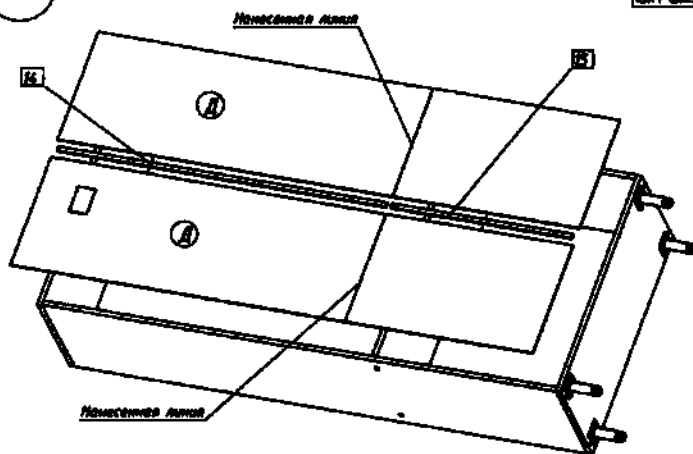

9 этап

Произведите установку полок


12x3 мм

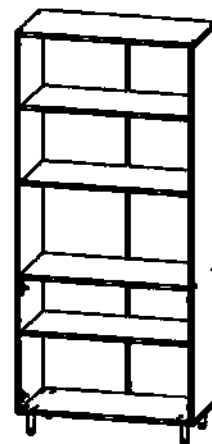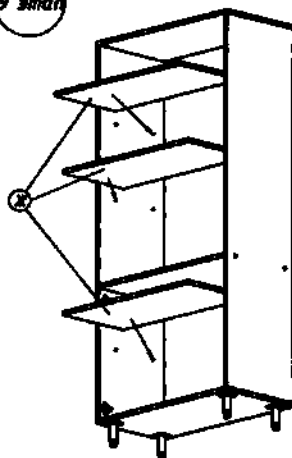

Произведите установку дверей

10 этап

3x7 мм
10x7 мм

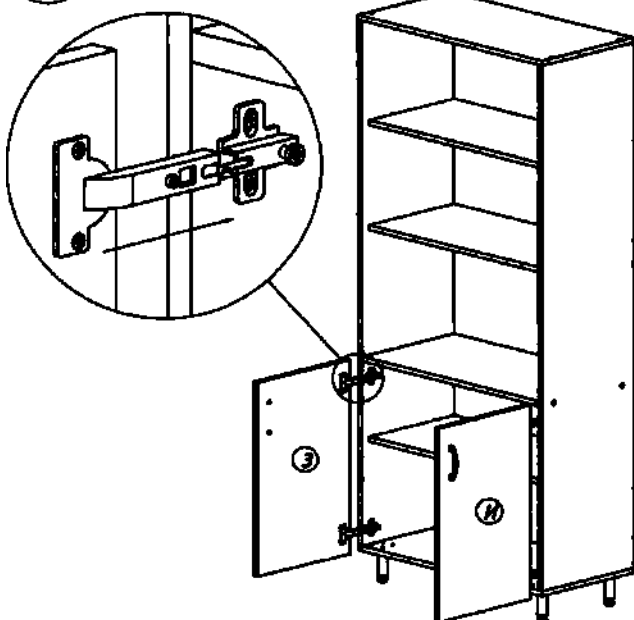


После установки дверей, производите регулировку петель

Боковая регулировка (перекос дверей)




Вертикальная регулировка

Фронтальная регулировка

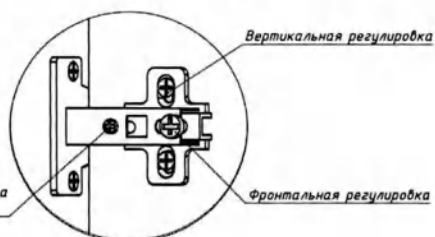

11 этап

После сборки изделия наклейте самоклеящийся амортизационный комплект, входящий в комплект поставки, согласно данной схеме.

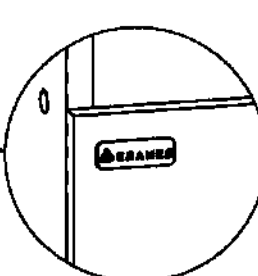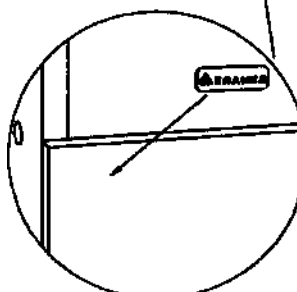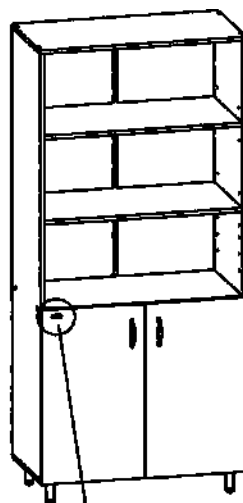

Инструкция по сборке изделия
Шкафы медицинские ГИКС Р42810.107ТУ
Шкаф медицинский для хранения медицинских
изделий (мод. 16)

Условные обозначения:

1. А-Р : детали

2. [1] - [26] : крепёж и фурнитура

3. (1) - (21) : этапы сборки



Код 15393

Детали

№	Наименование	Кол - во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Перекладина нижняя	1
Г	Шкафчик	1
Д	Дверца	2
Е	Плита перфорационная	1
Ж	Плита	2
З	Плита	1
И	Плита задняя	1
К	Плита выдвижная	1
Л	Перекладина	1
М	Фасад ящика	1
Н	Корпус ящика	1
О	Стенка задняя	1
П	Стенка левая	1
Р	Дверь	2

1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
[1]	20	Конфирмат	
[2]	14	Заглушка конфирмата	
[3]	16	Шкант мебельный	
[4]	4	Опора	
[5]	16	Винт М4х25	
[6]	16	Гайка 4	
[7]	16	Шайба 4	
[8]	62	Гвоздь 1,6х25	
[9]	2	Магнит	
[10]	16	Полкодержатель	
[11]	4	Ручка мебельная	
[12]	4	Винт М4х25	
[13]	15	Саморез с прессшайбой 4,2х14	
[14]	16	Заглушка самоклеющаяся	
[15]	4	Саморез 3х12	
[16]	4	Штифт петли	

2

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
[17]	1 комплект	Направляющие для выдвижной полки	
[18]	2 комплекта	Направляющие	
[19]	4	Петля ввертная	
[20]	1	Брус соединительный 1022 мм	
[21]	20	Саморез 3,5х13	
[22]	8	Саморез 4,5х16	
[23]	4	Винт М4х30	
[24]	1	Ключ шестигранный 4мм	
[25]	4	Саморез 3,5х16	
[26]	1	Логотип компании	

* Конфирматы [1] закручивать ключом шестигранным [24] заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

Схема сборки изделия

1 этап Произведите сборку стенки левой

При необходимости полкодержатели [10], следует забивать легкими ударами молотка

2 этап Произведите сборку стенки правой

При необходимости полкодержатели [10], следует забивать легкими ударами молотка

3


4

СМ № 29.1219.00

Произведите сборку панели
монтажной

3 этап


6x1 шт.
3x4 шт.

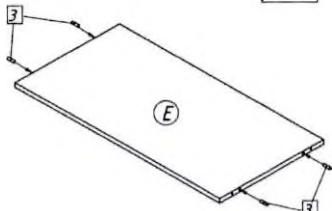

Произведите сборку панели верхней

4 этап

1х3 шт.
1х1 шт.
1х6 шт.
2х6 шт.

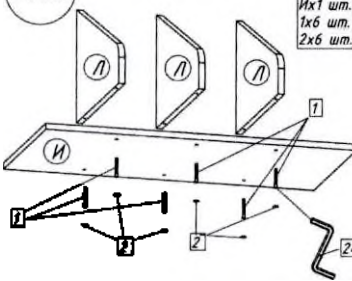


СМ № 29.1219.00

Произведите сборку 2-х ячеек выдвигая

7 этап


1х2 шт.
1х2 шт.
11х2 шт.
22х8 шт.
23х4 шт.

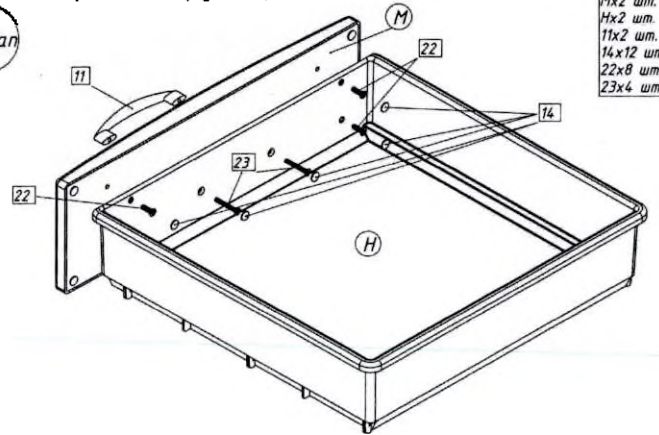

Произведите сборку перегородки
нижней

5 этап

8x1 шт.
3x4 шт.
9x2 шт.
10x4 шт.
15x4 шт.
18/1x2 шт.
21x4 шт.

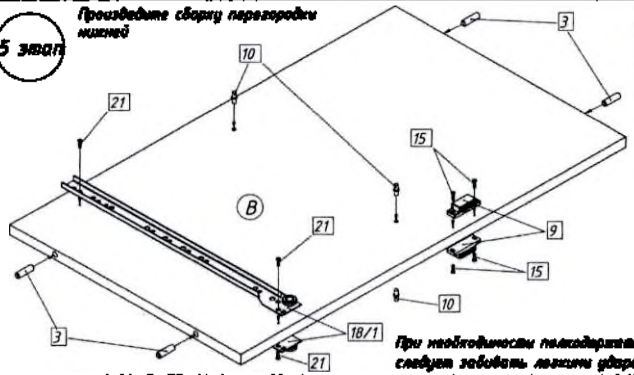


При необходимости гелеидеритела 29,
следует добавить левый ударник молотка

Произведите сборку 2-х дверей

6 этап


Px2 шт.
11x2 шт.
12x4 шт.
14x4 шт.

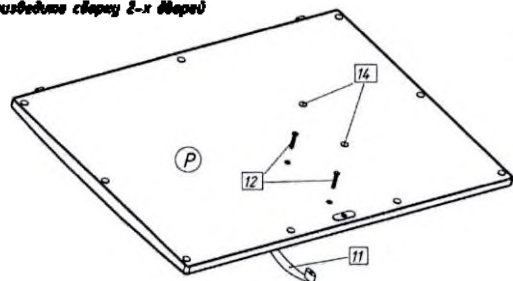

Произведите установку направляющих

8 этап

1х2 шт.
18/2x4 шт.
21x8 шт.

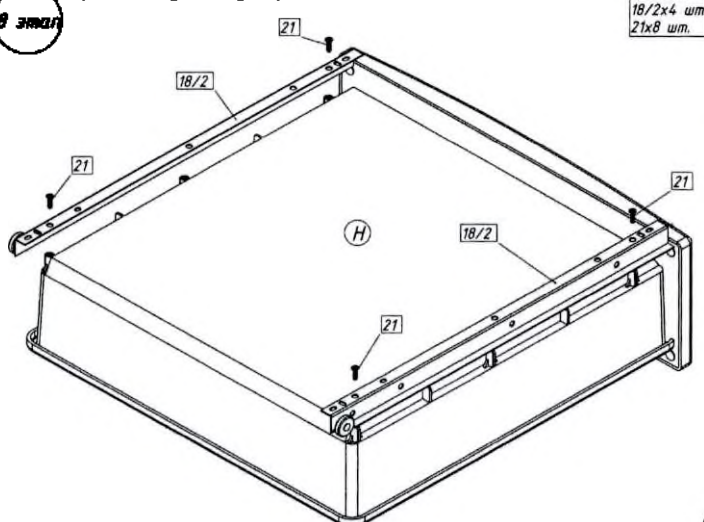


СМ № 29.1219.00

Произведите установку опор

9 этап


1х1 шт.
4x4 шт.
5x6 шт.
6x6 шт.
7x6 шт.

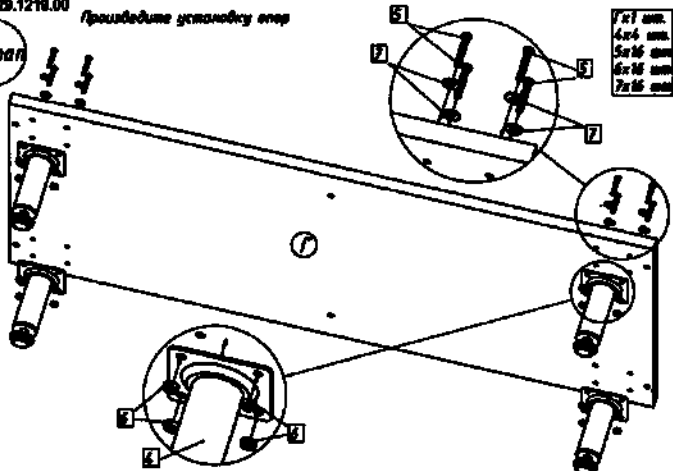

Произведите сборку каркаса

10 этап

1х1 шт.
1х1 шт.
1х6 шт.
2х6 шт.

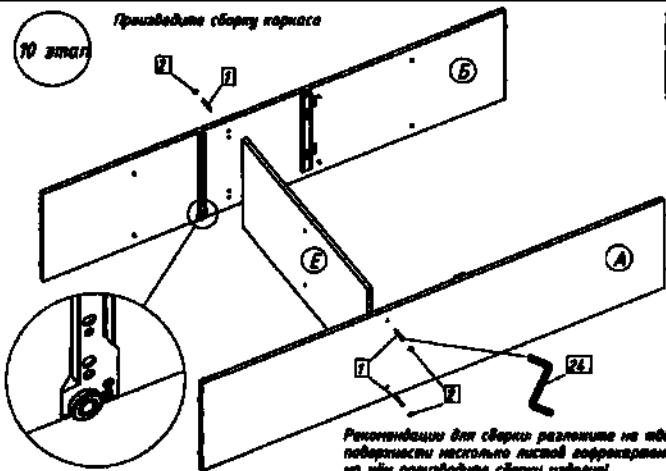


Рекомендации для сборки: разложите на твердой
поверхности несколько листов гофрокартона и
на них производите сборку изделия!
Детали А и Б следует установить таким образом,
что бы пластиковый замок направляющих 18/1,
защелкнулся.

СМ № 29.1219.00

Произведите установку перегородки и оснований

11 этап


1х1 шт.
1х1 шт.
1х6 шт.

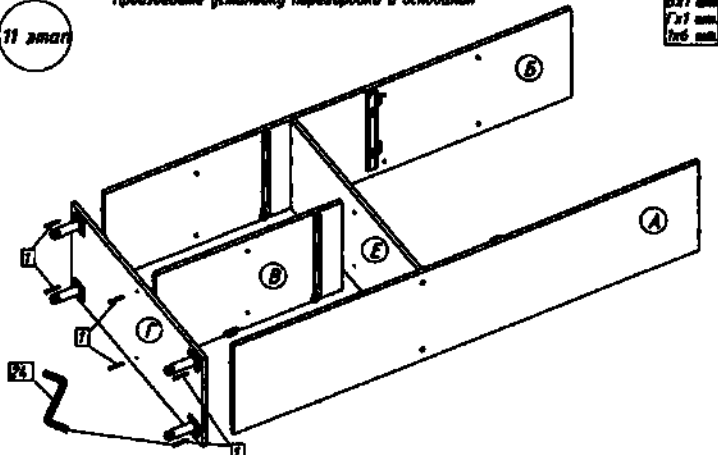

Произведите установку крышки

12 этап


1х1 шт.
1х4 шт.
2х4 шт.

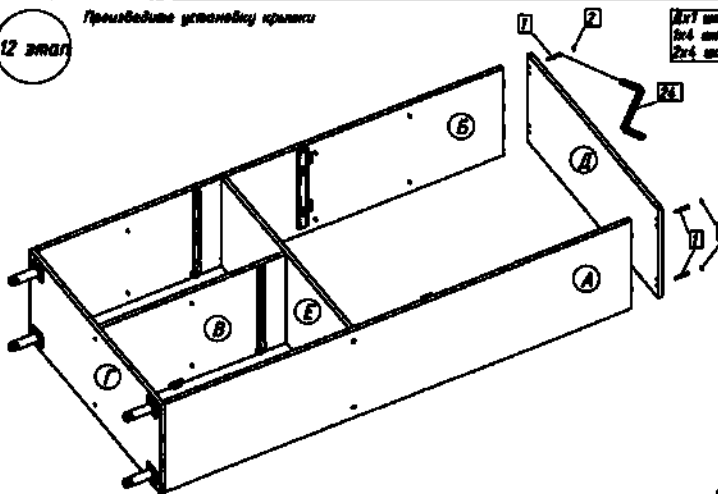

ОМ № 29.1219.00

Произведите установку стенок задних, предварительно установив брусок соединительный


13 этап

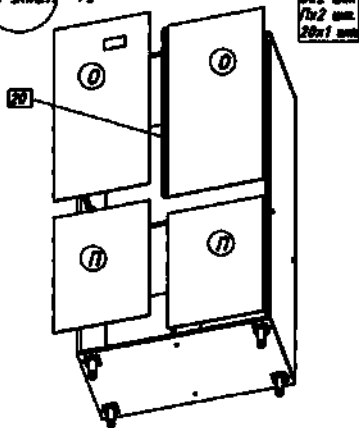

14 этап

Произведите крепление стенок задних, с шагом 100-150 мм и вставьте от края на дно



10x2 мм

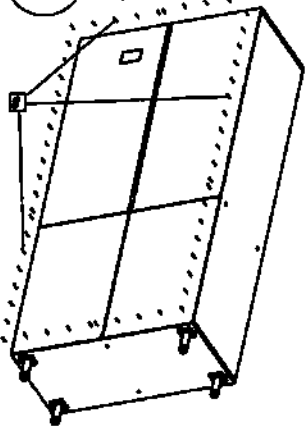

ОМ № 29.1219.00

Произведите установку полки выдвижной

16 этап

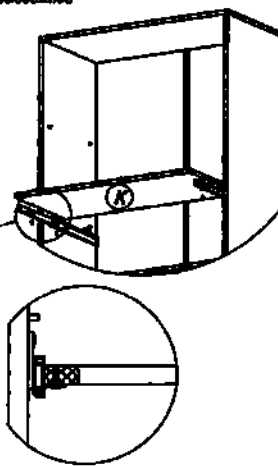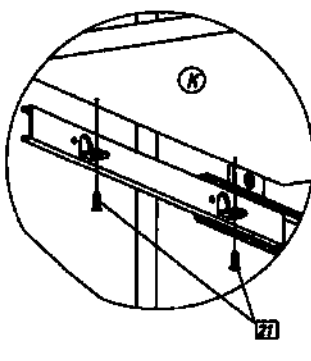



10x1 мм, 22x4 мм

15 этап

Произведите крепление стенок задних с перекладиной и полкой, саморезами

10x5 мм

Схема расположения отверстий и саморезов

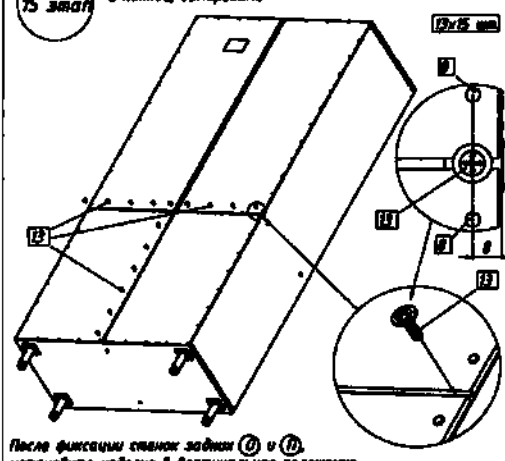
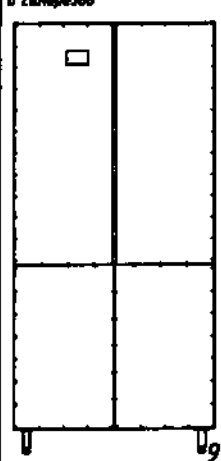


После фиксации стенок задних (13) и (14), установите изделие в вертикальное положение

17 этап

Произведите установку остальных полок



10x2 мм, 30x1 мм, 10x1 мм

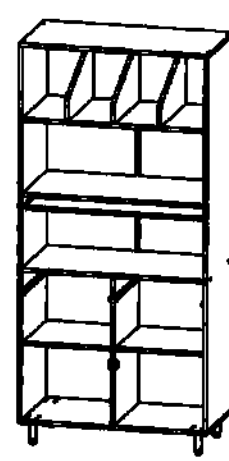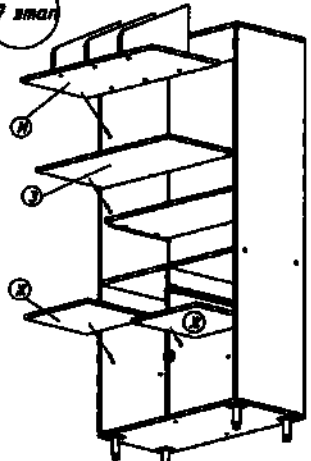

ОМ № 29.1219.00



Произведите установку полки боковой

18 этап

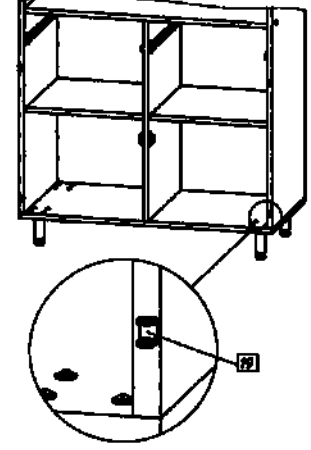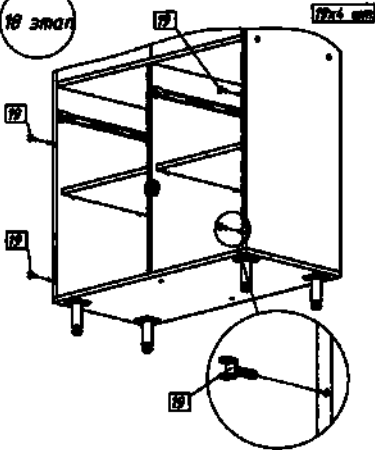

19 этап

Произведите установку 2-х дверей

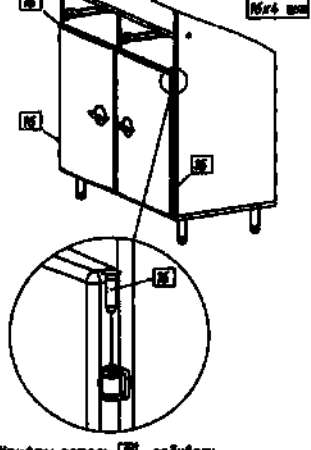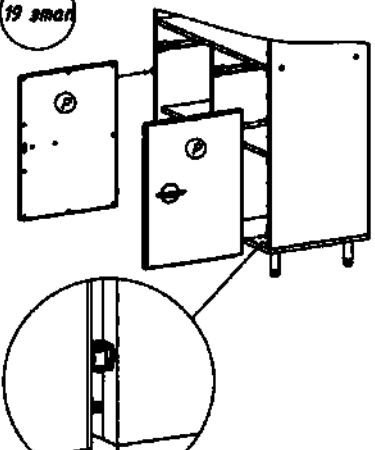


Метки петель (20), закройте дверцы полностью

ОМ № 29.1219.00




Произведите установку 2-х ящиков

20 этап

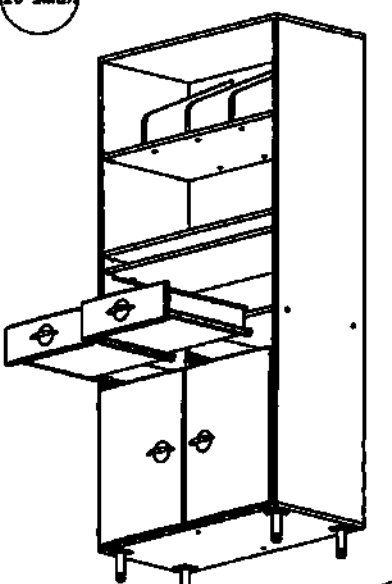

21 этап

После сборки изделия нанесите саморезы, входящий в комплект поставки, согласно данной схеме

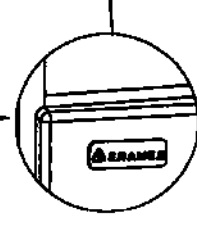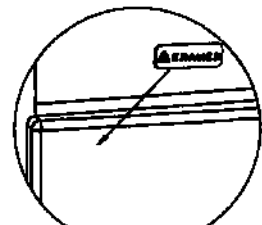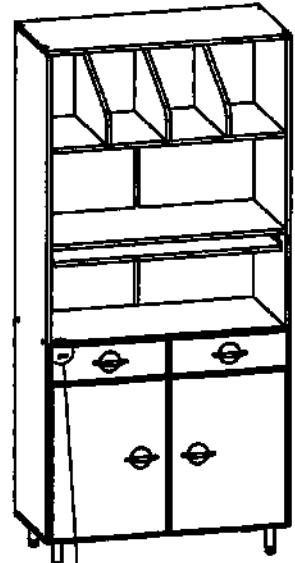


Инструкция по сборке изделия
Шкафы медицинские ГИКС.942810.107ТУ
Шкафы медицинские для хранения медицинских
изделий (мод. 17)

Условные обозначения:

1. А-С : детали

2. [1] - [30] : крепёж и фурнитура

3. (1) - (22) : этапы сборки

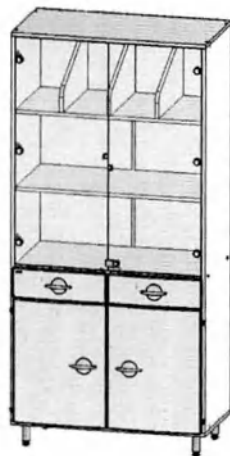

Код 15904

Детали

№	Наименование	Кол - во
А	Стекло левое	1
Б	Стекло правое	1
В	Перекладина нижняя	1
Г	Стойка	1
Д	Крепеж	1
Е	Полка регулируемая	1
Ж	Полка	2
З	Полка	1
И	Полка боковая	1
К	Дверь	2
Л	Перекладина	2
М	Фасад ящика	2
Н	Корпус ящика	2
О	Стекло заднее	2
П	Стекло боковое	2
Р	Стеклобоковина левая	1
С	Стеклобоковина правая	1

Крепёж и фурнитура


Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	20	Евровинт	
2	14	Заглушка евровинта	
3	16	Шкант мебельный	
4	4	Опора	
5	16	Винт М4х25	
6	16	Гайка 4	
7	16	Шайба 4	
8	62	Гвоздь 1,6х25	
9	2	Магнит	
10	16	Полкодержатель	
11	4	Ручка мебельная	
12	4	Винт М4х25	
13	15	Саморез с прессшайбой 4,2х14	
14	16	Заглушка самоклеющаяся	
15	6	Саморез 3х12	
16	4	Штифт петли	

Крепёж и фурнитура


Арт.	Кол - во	Обозначение	
17	6	Петля для стекла стандартная (90/105) вкладная	
18	2 комплекта	Направляющие	
19	12	Саморез 4х16	
20	4	Петля ввертная	
21	1	Брус соединительный 1022 мм	
22	16	Саморез 3,5х13	
23	8	Саморез 4,5х16	
24	4	Винт М4х30	
25	6	Заглушка декоративная для петли, круглая	
26	1	Полкодержатель в пластиковом чехольчике	
27	1	Занок для 2-х дверей + отв. планка	
28	2	Ручка для стекл. дверей	
29	1	Ключ шестигранный 4мм	
30	1	Логотип компании	

Схема сборки изделия**1 этап**

Произведите сборку стенки левой

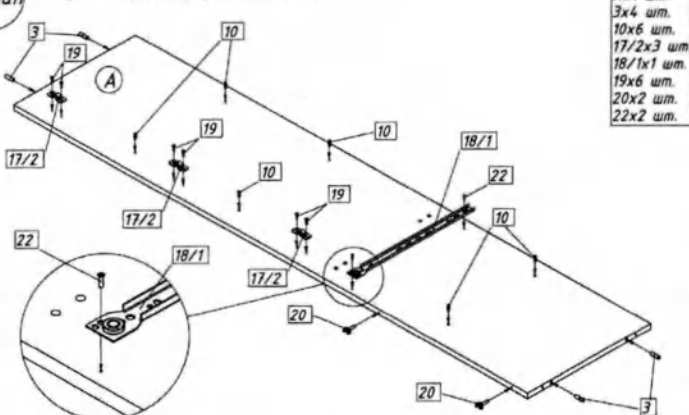**2 этап**


Произведите сборку стенки правой

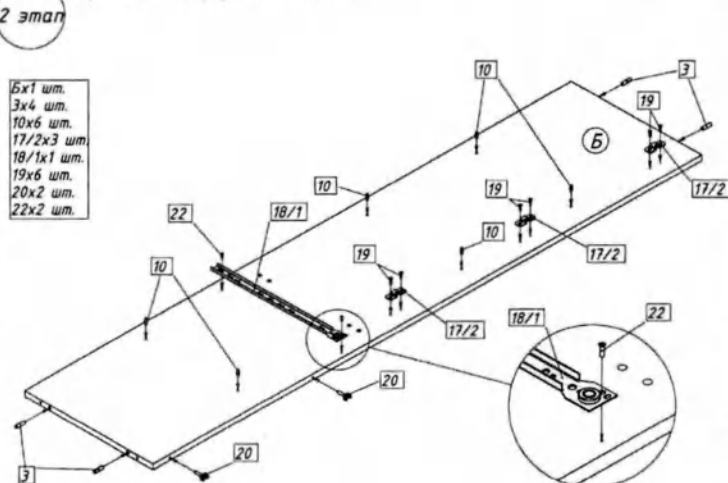

ОМ № 29.1220.00

Произведите сборку панели межсекционной


3 этап

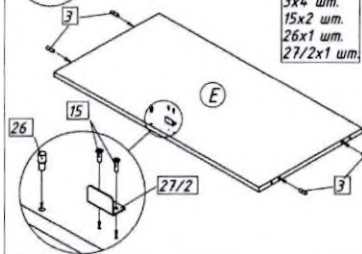

Ех1 шт.
3х4 шт.
15х2 шт.
26х1 шт.
27/2х1 шт.

Произведите сборку панели верхней

4 этап

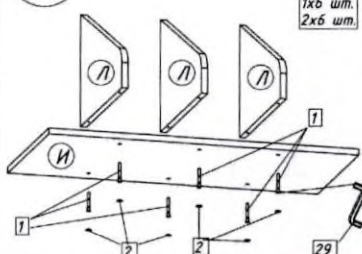


Их3 шт.
Нх1 шт.
1х6 шт.
2х6 шт.

ОМ № 29.1220.00

Произведите сборку 2-х ящиков выдвинутых


7 этап

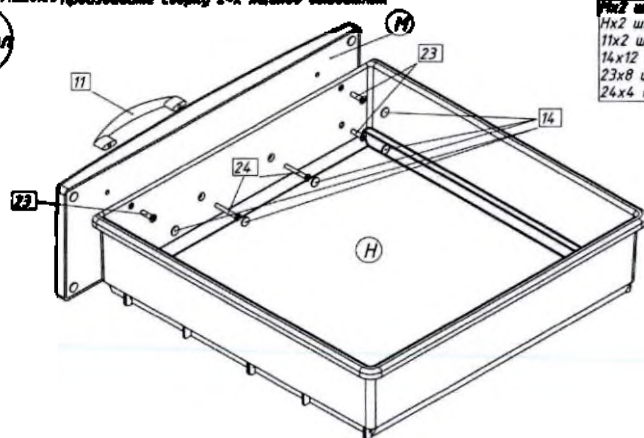

Рх2 шт.
Нх2 шт.
11х2 шт.
14х12 шт.
23х8 шт.
24х4 шт.

Произведите сборку перегородки нижней


5 этап

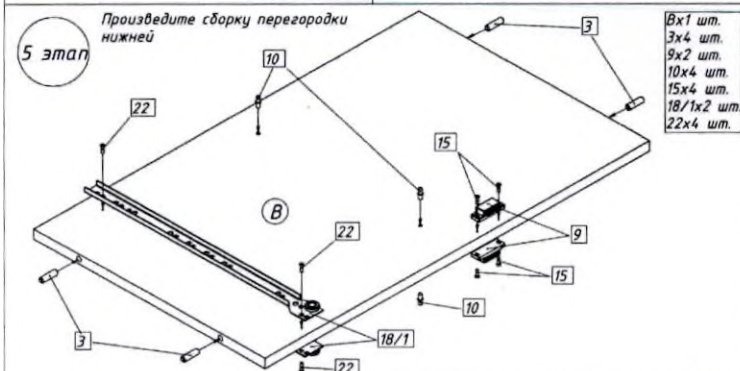

Вх1 шт.
3х4 шт.
9х2 шт.
10х4 шт.
15х4 шт.
18/1х2 шт.
22х4 шт.

Произведите сборку 2-х дверей


6 этап

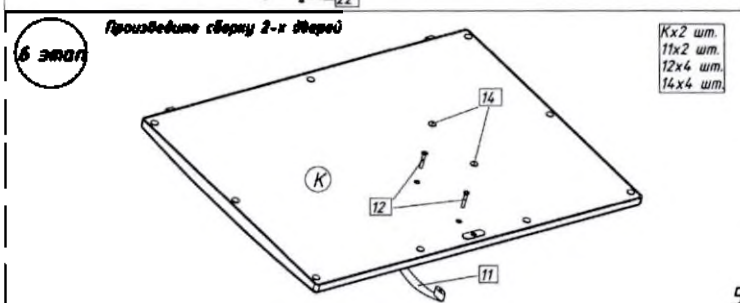

Кх2 шт.
11х2 шт.
12х4 шт.
14х4 шт.

Произведите установку направляющих

8 этап

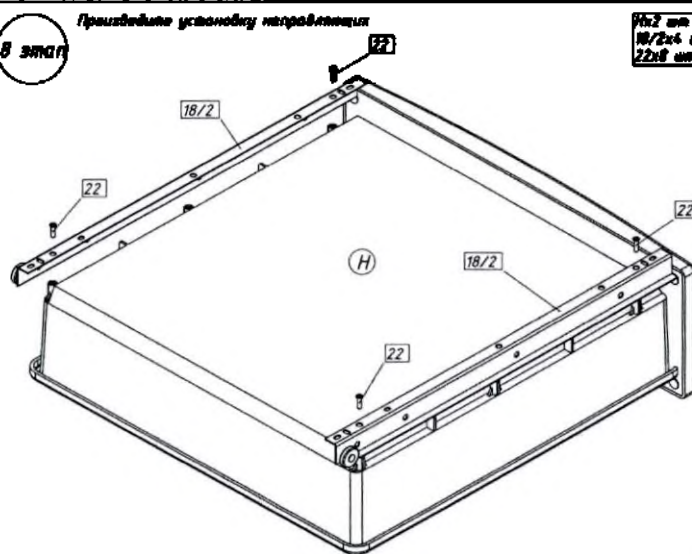


Рх2 шт.
18/2х4 шт.
22х8 шт.

ОМ № 29.1220.00

Произведите сборку каркаса

9 этап

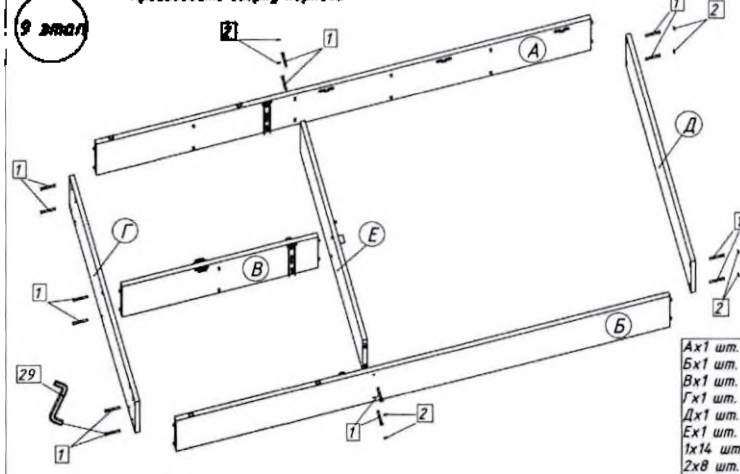


Ах1 шт.
Бх1 шт.
Вх1 шт.
Гх1 шт.
Дх1 шт.
Ех1 шт.
1х14 шт.
2х8 шт.

ОМ № 29.1220.00

Произведите установку стенок задних, предварительно установив брус соединительный


11 этап

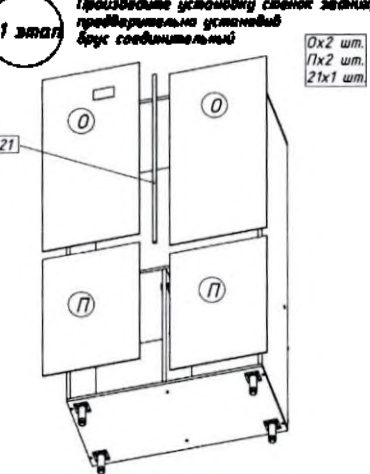

Ох2 шт.
1х2 шт.
21х1 шт.

Произведите крепление стенок задних сдвинув


12 этап

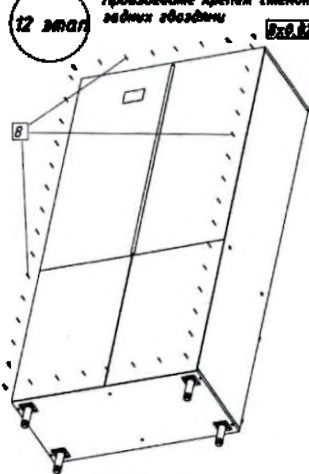

Вх6 шт.

Произведите установку опор


10 этап

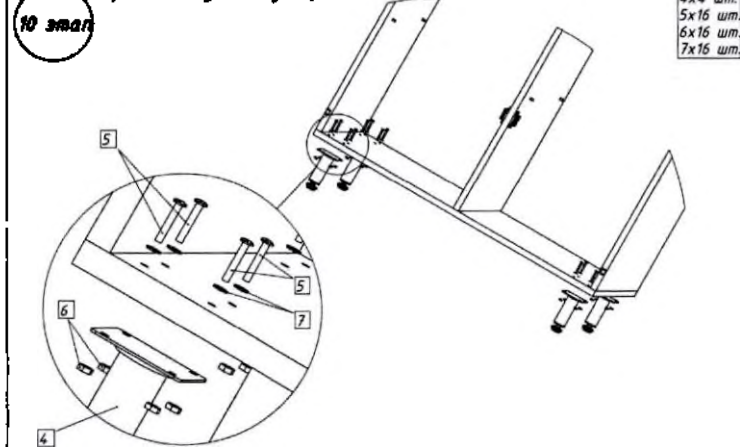

4х4 шт.
5х16 шт.
6х16 шт.
7х16 шт.


Произведите крепление стенок задних с перегородкой и полкой, саморезами

13 этап


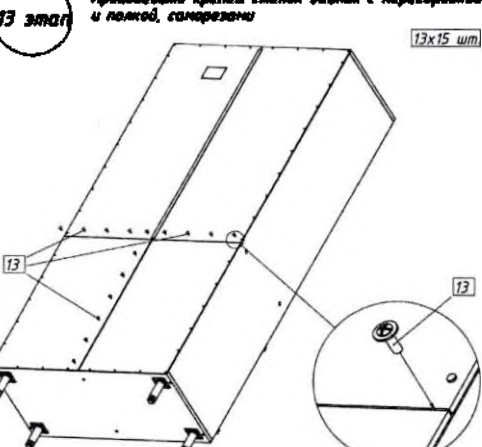


13х15 шт.


Схема расположения ящиков и саморезов

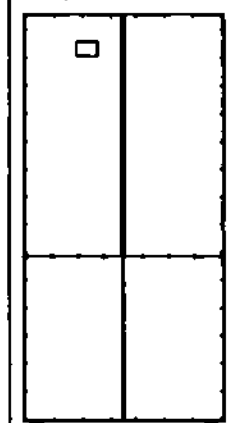

OM № 29.1220.00 Произведите установку полок

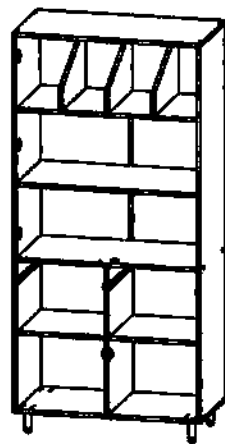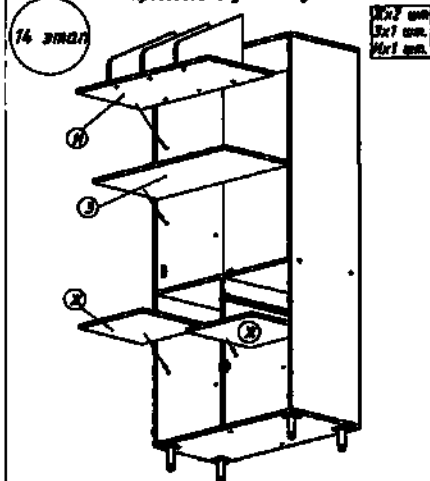


OM № 29.1220.00 Произведите установку 2-х пластиковых дверей

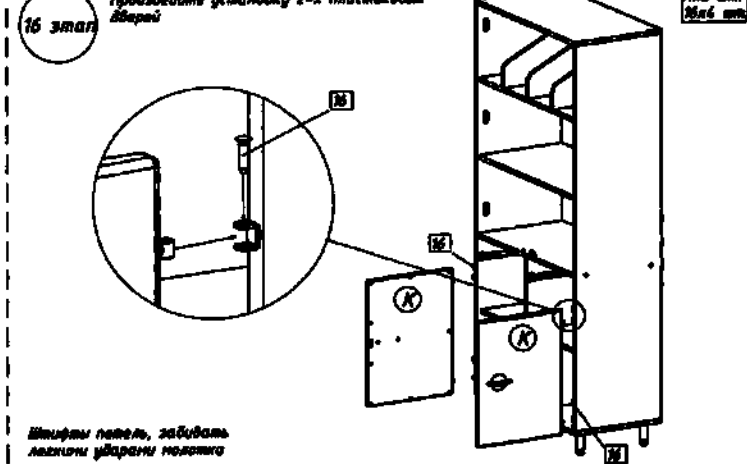


Штифты петель, забивать
легкими ударами молотка

15 этап Произведите сборку 2-х стеклодверей

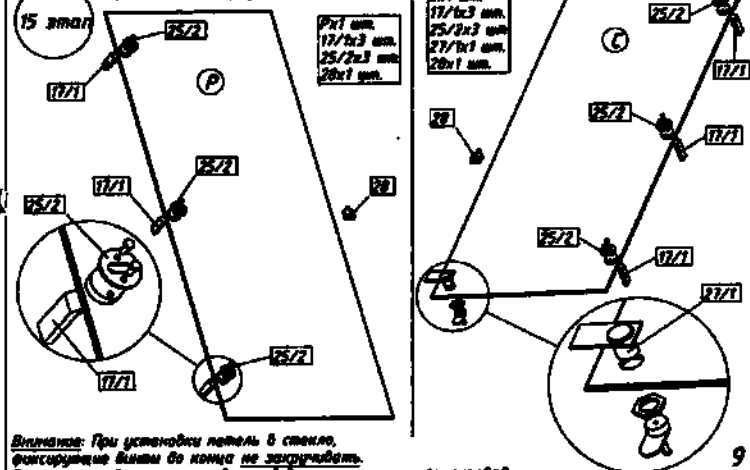


Внимание: При установке петель в стекло, фиксирующие винты до конца не закручивать. Ручки установить на произвольной высоте, слегка зафиксировать.

17 этап Произведите установку 2-х ящиков

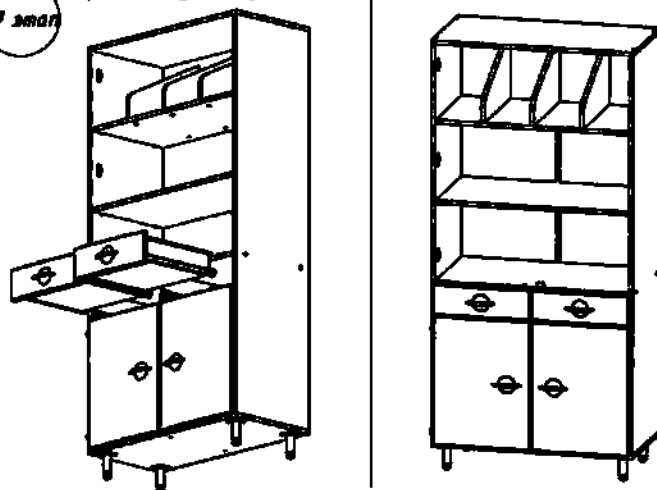


OM № 29.1220.00 18 этап Произведите установку стеклодверцы левой

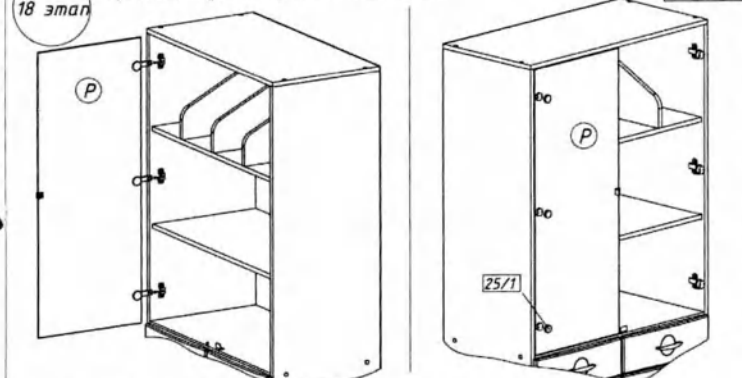


Внимание: Установку стекла, производить только в вертикальном положении шкафа. После установки стеклодверцы, затянуть все фиксирующие винты петель до ощутимого сопротивления и установить заглушки [25/1]. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов, это может привести к порче стеклянной дверцы.

19 этап Произведите установку стеклодверцы правой

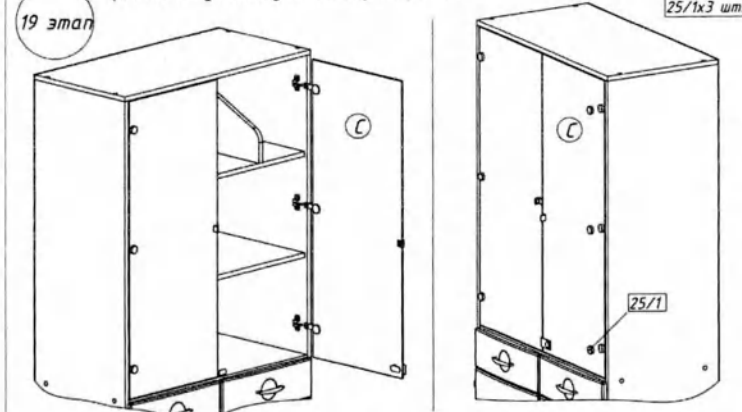


Внимание: Установку стекла, производить только в вертикальном положении шкафа. После установки стеклодверцы, затянуть все фиксирующие винты петель до ощутимого сопротивления и установить заглушки [25/1]. Опасайтесь чрезмерной затяжки



OM № 29.1220.00 20 этап Произведите регулировку ручек

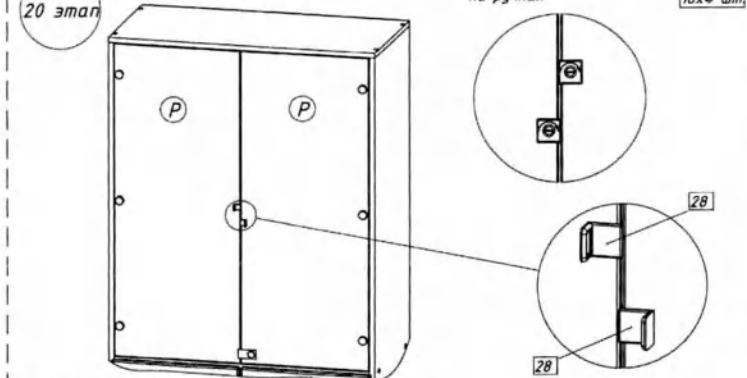

Отрегулируйте ручки на стеклянных дверях, установив их на удобную высоту. Затяните на ручках фиксирующие винты, до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов на ручках, это может привести к порче стеклянной дверцы.

21 этап Готовое изделие

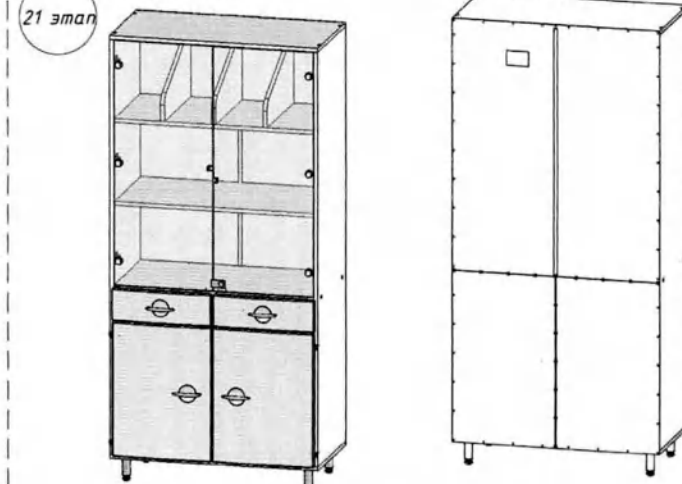

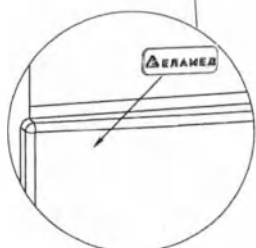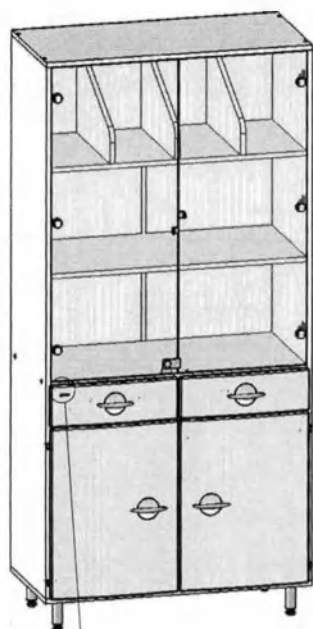

скреплено печатью 6/11 листа(ов).

Директор по развитию АО «ПЗ»

Ефимкина Т.Е.

20 29

