

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Елань»
Несмачный Ю.В.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

«Тележки медицинские СЭТ по ТУ 32.50.50-001-06441308-2021

в вариантах исполнения с принадлежностями»

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Тележки медицинские СЭТ по ТУ 32.50.50-001-06441308-2021 в вариантах исполнения с принадлежностями

2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

188550 Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Старополье, здание МТМ, корпус 1, лит ГЗ, помещение 2.

3. АДРЕСА МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА

Общество с ограниченной ответственностью "Елань" (ООО "Елань"), 1. 188550, Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Старопольское сельское поселение, севернее деревни Старополье, здание МТМ, корпус 1, лит. ГЗ, помещение 5

4. СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

4.1 Тележки медицинские СЭТ по ТУ32.50.50-001-06441308-2021 в вариантах исполнения с принадлежностями (см. Приложение) имеет сертифицированную систему менеджмента качества дизайна, разработки, производства и распространения.

Подтверждается следующим документом:

Технические условия ТУ32.50.50-001-06441308-2021

5. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ

Для транспортировки медицинских и хирургических инструментов, иногда стерильных источников, от центральной станции снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Тележки состоят из платформы, своим размером обеспечивающей устойчивость во время транспортировки, вертикальных стоек для крепления крюков, к которым подвешиваются стеллажи, и поручней для маневрирования и перемещения. Тележки оборудованы роликами с блокировкой направления и со стопором, для безопасной транспортировки. Подвесная система позволяет избежать деформации и перегрузки от установки секций одна на другую.

7. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки тележек должен соответствовать Таблице №1.

Таблица №1 Комплект поставки.

№	Наименование	Обозначение документа	Количество, шт.
1.	Тележка передвижная в вариантах исполнения (см. Приложение А)	ЕЛАН. 942814.001	1
2.	Стеллаж (см. Приложение А)	ЕЛАН. 942814.001	от 1 до 10 (при необходимости)
3.	Руководство по эксплуатации	ЕЛАН. 942814.001.РЭ	1
4.	Гарантийный талон	ЕЛАН. 942814.001.ГТ	1

8. МЕТОДЫ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

Еженедельно очищайте тележки и стеллажи мягкой тканью и бытовым (неагрессивным и неабразивным моющим средством). Очищайте стеллажи, когда они холодные.

Моющее средство следует смывать водой. При использовании водопроводной воды для окончательной промывки необходимо использовать дистиллированную или деминерализованную воду.

ВНИМАНИЕ! Не используйте металлические мочалки и металлические щетки для очистки оборудования!

9. НАЗНАЧЕНИЕ

Для транспортировки медицинских и хирургических инструментов, иногда стерильных источников, от центральной станции снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы

10. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ

Варианты исполнения тележек см. в Приложении А.

11. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинское изделие показано для обеспечения оптимизации логистики путем малой механизации процесса, снижения весовых нагрузок.

11.1. Условия применения;

Температура от +10 до +35 °С, влажность от 25 до 80 %.

11.2. Меры предосторожности при применении.

Не нагружайте на оборудование более 80 кг. Не пользуйтесь оборудованием, имеющим видимые повреждения или дефекты. Не используйте тележки не по назначению.

12. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказания не выявлены.

13. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Побочные эффекты не выявлены.

14. ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ТЕЛЕЖЕК

Таблица №2 Габаритные размеры и масса тележек

№	Вариант исполнения тележки	Габаритные размеры (Д x Ш x В) ¹ , мм	Масса ² , кг
1	Тележка передвижная для 1 стеллажа	673x583x1328	16
		648x618x1325	16
		625x600x1250	15
		673x632x1328	16
		720x600x1110	14
		650x600x1340	16
		720x482x1066	16
2	Тележка передвижная для 2 стеллажей	810x750x1589	32
		810x820x1589	34
		810x820x2000	34

Примечание: 1. Предельно допустимое отклонение от размеров ± 2 %.

2. Предельно допустимое отклонение от массы ± 5 %.

Таблица №3 Габаритные размеры и масса стеллажей без колёсиков

№	Вариант исполнения стеллажа без колесиков	Габаритные размеры (Д x Ш x В) ¹ , мм	Масса ² стеллажа без колесиков (1 полка), кг	Масса ^{2с} стеллажа без колесиков (6 полок), кг	Масса ² одной полки, кг
1.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	940x450x465	18	31,5	2,7
2.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	630x610x625	17	29,5	2,5
3.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	800x610x904	25	40,75	3,15
4.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	930x610x625	21	39,5	3,7
5.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	960x610x904	32	51	3,8
6.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	630x610x575	17	29,5	2,5
7.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	800x610x855	25	40,75	31,5
8.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	930x610x575	21	39,5	3,7
9.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	938x460x405	18	32	2,8
10.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	960x610x855	32	51	3,8
11.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	630x610x120	9	21,5	2,5
12.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	800x610x855	12	27,75	3,15
13.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	460x430x550	10	16,5	1,3
14.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	640x430x550	14	23	1,8
15.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	1100x430x550	18	33,5	3,1
16.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	980x530x550	16	33	3,1
17.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	700x600x596	28	41,5	2,7
18.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	630x600x800	28	40	2,4
19.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	700x600x596	17	30,5	2,7

20.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	630x600x800	21	33	2,4
21.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	625x615x800	22,5	35	2,5
22.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	625x615x1100	27	39,5	2,5
23.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	650x580x800	21	33	2,4
24.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	600x625x560	20	32	2,4
25.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	600x625x540	20	32	2,4
26.	Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	700x430x540	15	24,5	1,9
27.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	940x450x465	18	31,5	2,7
28.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	630x610x625	17	29,5	2,5
29.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	800x610x904	25	40,75	3,15
30.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	930x610x625	21	39,5	3,7
31.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	960x610x904	32	51	3,8
32.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	630x610x575	17	29,5	2,5
33.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	800x610x855	25	40,75	3,15
34.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	930x610x575	21	39,5	3,7
35.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	938x460x405	18	32	2,8
36.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	960x610x855	32	51	3,8
37.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	630x610x120	9	21,5	2,5
38.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	800x610x855	12	27,75	3,15
39.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	460x430x550	10	16,5	1,3
40.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	640x430x550	14	23	1,8

41.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	1100x430x550	18	33,5	3,1
42.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	980x530x550	16	33	3,4
43.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	700x600x596	28	41,5	2,7
44.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	630x600x800	28	40	2,4
45.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	700x600x596	17	30,5	2,7
46.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	630x600x800	21	33	2,4
47.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	625x615x800	22,5	35	2,5
48.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	625x615x1100	27	39,5	2,5
49.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	650x580x800	21	33	2,4
50.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	600x625x560	20	32	3,4
51.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	600x625x540	20	32	2,4
52.	Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	700x430x540	15	24,5	1,9

Примечание: 1. Предельно допустимое отклонение от размеров ± 2 %.

2. Предельно допустимое отклонение от массы ± 5 %.

Таблица №4. Габаритные размеры и масса стеллажей с колёсиками

№	Вариант исполнения стеллажа с колесиками	Габаритные размеры (Д x Ш x В) ¹ , мм	Масса ² стеллажа с колесиками (1 полка), кг	Масса ^{2с} стеллажа с колесиками (6 полок), кг	Масса ² одной полки, кг
1.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	940x450x465	18	31,5	2,7
2.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	630x610x625	17	29,5	2,5
3.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	800x610x904	25	40,75	3,15
4.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	930x610x625	21	39,5	3,7
5.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	960x610x904	32	51	3,8
6.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	630x610x575	17	29,5	2,5

№	Вариант исполнения стеллажа с колесиками	Габаритные размеры (Д х Ш х В) ¹ , мм	Масса ² стеллажа с колесиками (1 полка), кг	Масса ^{2с} стеллажа с колесиками (6 полок), кг	Масса ² одной полки, кг
7.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	800x610x855	25	40,75	3,15
8.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	930x610x575	21	39,5	3,7
9.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	938x460x405	18	32	2,8
10.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	960x610x855	32	51	3,8
11.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	630x610x120	9	21,5	2,5
12.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	800x610x855	12	27,75	3,15
13.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	460x430x550	10	16,5	1,3
14.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	640x430x550	14	23	1,8
15.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	1100x430x550	18	33,5	3,1
16.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	980x530x550	16	33	3,4
17.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	700x600x596	28	41,5	2,7
18.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	630x600x800	28	40	2,4
19.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	700x600x596	17	30,5	2,7
20.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	630x600x800	21	33	2,4
21.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	625x615x800	22,5	35	2,5
22.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	650x580x800	21	33	2,4
23.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	625x615x1100	27	39,5	2,5
24.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	600x625x560	20	32	2,4
25.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	600x625x540	20	32	2,4
26.	Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок)	700x430x540	15	24,5	1,9

№	Вариант исполнения стеллажа с колесиками	Габаритные размеры (Д х Ш х В) ¹ , мм	Масса ² стеллажа с колесиками (1 полка), кг	Масса ² стеллажа с колесиками (6 полок), кг	Масса ² одной полки, кг
27.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	940х450х465	18	31,5	2,7
28.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	630х610х625	17	29,5	2,5
29.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	800х610х904	25	40,75	3,15
30.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	930х610х625	21	39,5	3,7
31.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	960х610х904	32	51	3,8
32.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	630х610х575	17	29,5	2,5
33.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	800х610х855	25	40,75	3,15
34.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	930х610х575	21	39,5	3,7
35.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	938х460х405	18	32	2,8
36.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	960х610х855	32	51	3,8
37.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	630х610х120	9	21,5	2,5
38.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	800х610х855	12	27,75	3,15
39.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	460х430х550	10	16,5	1,3
40.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	640х430х550	14	23	1,8
41.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	1100х430х550	18	33,5	3,1
42.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	980х530х550	16	33	3,4
43.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	700х600х596	28	41,5	2,7
44.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	630х600х800	28	40	2,4
45.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	700х600х596	17	30,5	2,7
46.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	630х600х800	21	33	2,4

№	Вариант исполнения стеллажа с колесиками	Габаритные размеры (Д x Ш x В) ¹ , мм	Масса ² стеллажа с колесиками (1 полка), кг	Масса ² стеллажа с колесиками (6 полок), кг	Масса ² одной полки, кг
47.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	625x615x800	22,5	35	2,5
48.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	625x615x1100	27	39,5	2,5
49.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	650x580x800	21	33	2,4
50.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	600x625x560	20	32	2,4
51.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	600x625x540	20	32	2,4
52.	Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок)	700x430x540	15	24,5	1,9

Примечание: 1. Предельно допустимое отклонение от размеров ± 2 %.

2. Предельно допустимое отклонение от массы ± 5 %.

15. УПАКОВКА

Тележки должна быть упакована в соответствии с ГОСТ 16371:

Упаковка должна обеспечивать сохранность тележек от загрязнения, механических повреждений, атмосферных воздействий при транспортировании и хранении, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Полки тележек должны быть закрыты закреплены средствами, исключающими повреждение тележек.

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон упаковывают в пакет полимерный и укладывают в комплект поставки.

16. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

15.1. Изделие подлежит транспортированию в транспортной упаковке всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с условиями транспортировки, действующими на каждом виде транспорта, при условиях, соответствующих условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

15.2. Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

17. МАРКИРОВКА

На каждое изделие наносят этикету с маркировкой по ГОСТ 16371. Маркировка должна быть хорошо читаемой и содержать:

- наименование и товарный знак предприятия изготовителя;

- адрес предприятия-изготовителя;
- номер изделия по системе нумерации предприятия изготовителя;
- условное обозначение изделия;
- габаритные размеры;
- грузоподъемность;
- указания на совместимость с тележкой (для стеллажей);
- номер регистрационного удостоверения;
- год выпуска;

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с указанием знаков: «Верх», «Беречь от влаги». Транспортная маркировка должна наноситься по трафарету или штемпелеванием черной водостойкой краской.

18. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие тележек требованиям настоящего нормативного документа при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

При нормальных условиях тележка требует минимального обслуживания, но рекомендуется отслеживать любые изменения в их работе, например, изменения в устойчивости, повреждение колес. При обнаружении подобных повреждений тележку необходимо тщательно осмотреть и отремонтировать.

Хотя оборудованию не требуется специальное техническое обслуживание, рекомендуется ежегодно подвергать его тщательному осмотру. При этом следует обратить внимание на следующее:

- Проверка направляющих роликов, колесиков и их крепления;
- Проверка крепежных элементов оборудования и их затягивание в случае необходимости;
- Проверка сварных соединений.

20. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации отходов, а том числе в соответствии с СанПиНом 2.1.3684 для отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы).

Приложение А

Тележки медицинские СЭТ по ТУ 32.50.50-001-06441308-2021 в вариантах исполнения с принадлежностями:

I. Тележка передвижная для 1 стеллажа: 673х583х1328, в составе:

1. Тележка передвижная для 1 стеллажа 673х583х1328

2. Эксплуатационная документация:

2.1. Руководство по эксплуатации

2.2. Гарантийный талон

Принадлежности:

1. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 460х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

2. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 640х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

3. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 650х580х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

4. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 460х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

5. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 640х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

6. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 650х580х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

7. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 460х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

8. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 640х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

9. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 650х580х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

10. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 460х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

11. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 640х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

12. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 650х580х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

II. Тележка передвижная для 1 стеллажа: 648х618х1325, в составе:

1. Тележка передвижная для 1 стеллажа 648х618х1325

2. Эксплуатационная документация:

2.1. Руководство по эксплуатации

2.2. Гарантийный талон

Принадлежности:

1. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х625 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

2. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х575 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

3. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х120 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

4. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 460х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

5. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 640х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

6. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х600х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

7. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 625х615х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

8. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 650х580х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
9. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х625 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
10. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х575 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
11. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х120 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
12. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 460х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
13. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 640х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
14. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х600х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
15. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 625х615х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
16. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 650х580х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
17. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х625 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
18. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х575 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
19. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х120 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
20. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 460х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
21. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 640х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
22. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х600х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
23. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х600х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
24. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 625х615х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
25. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 650х580х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
26. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х625 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
27. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х575 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
28. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х120 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
29. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 460х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
30. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 640х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
31. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х600х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
32. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 625х615х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
33. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 650х580х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

III. Тележка передвижная для 1 стеллажа: 625х600х1250, в составе:

1. Тележка передвижная для 1 стеллажа 625х600х1250
2. Эксплуатационная документация:
 - 2.1. Руководство по эксплуатации
 - 2.2. Гарантийный талон
- Принадлежности:

- [illegible]

1. Тележка передвижная для 1 стеллажа 673х632х1328
2. Эксплуатационная документация:

- ## 2.2. Гарантийный талон

Принадлежности:

- [illegible]

29. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х600х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
30. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 625х615х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
31. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 625х615х1100 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
32. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 650х580х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
33. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 600х625х560 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
34. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 600х625х540 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
35. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х625 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
36. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х575 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
37. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х120 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
38. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 460х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
39. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 640х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
40. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х600х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
41. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х600х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
42. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 625х615х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
43. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 625х615х1100 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
44. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 650х580х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
45. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 600х625х560 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
46. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 600х625х540 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

V. Тележка передвижная для 1 стеллажа: 650х600х1340, в составе:

1. Тележка передвижная для 1 стеллажа 650х600х1340

2. Эксплуатационная документация:

- 2.1. Руководство по эксплуатации

- 2.2. Гарантийный талон

Принадлежности:

1. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х625 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
2. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х575 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
3. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х120 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
4. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 460х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
5. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 640х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
6. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х600х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
7. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 625х615х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
8. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 650х580х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

9. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х625 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
10. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х575 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
11. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х120 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
12. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 460х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
13. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 640х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
14. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х600х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
15. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 700х600х596 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
16. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х600х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
17. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 625х615х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
18. Стеллаж с колесиками с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 650х580х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
19. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х625 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
20. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х575 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
21. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х120 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
22. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 460х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
23. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 640х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
24. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х600х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
25. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 625х615х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
26. Стеллаж без колесиков с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 650х580х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
27. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х625 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
28. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х575 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
29. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х120 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
30. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 460х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
31. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 640х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
32. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х600х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
33. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 625х615х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
34. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 650х580х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

VI. Тележка передвижная для 1 стеллажа: 720х600х1110, в составе:

1. Тележка передвижная для 1 стеллажа 720х600х1110
 2. Эксплуатационная документация:
 - 2.1. Руководство по эксплуатации
 - 2.2. Гарантийный талон
- Принадлежности:

1. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 940х450х465 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
2. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 800х610х904 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
3. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 930х610х625 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
4. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 960х610х904 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
5. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 800х610х855 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
6. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 930х610х575 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
7. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 938х460х405 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
8. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 960х610х855 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
9. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 800х610х855 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
10. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 1100х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
11. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 980х530х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
12. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 700х600х596 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
13. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 700х600х596 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
14. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 700х430х540 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

VII. Тележка передвижная для 1 стеллажа: 720х482х1066, в составе:

1. Тележка передвижная для 1 стеллажа 720х482х1066
2. Эксплуатационная документация:
 - 2.1. Руководство по эксплуатации
 - 2.2. Гарантийный талон

Принадлежности:

1. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 940х450х465 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
2. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 938х460х405 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
3. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 1100х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
4. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 980х530х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
5. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 700х430х540 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

VIII. Тележка передвижная для 2 стеллажей: 810х750х1589, в составе:

1. Тележка передвижная для 2 стеллажей 810х750х1589
2. Эксплуатационная документация:
 - 2.1. Руководство по эксплуатации
 - 2.2. Гарантийный талон

Принадлежности:

1. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 940х450х465 от 1 до 10 шт. (при необходимости)
2. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х625 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
3. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 800х610х904 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

- [illegible]

-  ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

91. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 460х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
92. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 640х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
93. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 1100х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
94. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 980х530х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
95. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 700х600х596 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
96. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х600х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
97. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 700х600х596 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
98. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 630х600х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
99. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 625х615х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
100. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 625х615х1100 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
101. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 650х580х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
102. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 600х625х560 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
103. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 600х625х540 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
104. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 700х430х540 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

IX. Тележка передвижная для 2 стеллажей: 810х820х1589, в составе:

1. Тележка передвижная для 2 стеллажей 810х820х1589
2. Эксплуатационная документация:
 - 2.1. Руководство по эксплуатации
 - 2.2. Гарантийный талон

Принадлежности:

1. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 940х450х465 от 1 до 10 шт. (при необходимости)
2. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х625 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
3. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 800х610х904 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
4. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 930х610х625 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
5. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 960х610х904 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
6. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х575 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
7. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 800х610х855 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
8. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 930х610х575 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
9. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 938х460х405 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
10. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 960х610х855 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
11. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х120 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
12. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 800х610х855 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

- [illegible]

-  **ООО ЦИПМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

-  ООО ЦПМИ  [INFO@CPMI.RU](mailto:info@cpmi.ru)  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

100. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 625х615х1100 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
101. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 650х580х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
102. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 600х625х560 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
103. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 600х625х540 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
104. Стеллаж с колесиками с фиксированными полками (от 1 до 6 полок) 700х430х540 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

Х. Тележка передвижная для 2 стеллажей: 810х820х2000, в составе:

1. Тележка передвижная для 2 стеллажей: 810х820х2000
2. Эксплуатационная документация:
 - 2.1. Руководство по эксплуатации
 - 2.2. Гарантийный талон

Принадлежности:

1. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 940х450х465 от 1 до 10 шт. (при необходимости)
2. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х625 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
3. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 800х610х904 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
4. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 930х610х625 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
5. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 960х610х904 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
6. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х575 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
7. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 800х610х855 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
8. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 930х610х575 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
9. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 938х460х405 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
10. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 960х610х855 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
11. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х610х120 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
12. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 800х610х855 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
13. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 460х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
14. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 640х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
15. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 1100х430х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
16. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 980х530х550 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
17. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 700х600х59 от 1 до 10 шт.6 (при необходимости).
18. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х600х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
19. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 700х600х596 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
20. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 630х600х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).
21. Стеллаж без колесиков с выдвижными полками (от 1 до 6 полок) 625х615х800 от 1 до 10 шт. (при необходимости).

-  ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

-  ООО ЦПМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru)  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

-

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 22 листов

