


УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации

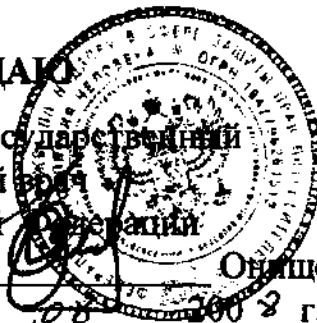

Онищенко Г.Г.

“ 15 ” 08 2008 г.

№ 0111/26-08

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Диагностикума эритроцитарного столбнячного антигенного жидкого

Диагностикум эритроцитарный столбнячный антигенный жидкий (далее диагностикум) представляет собой 3 % взвесь формализированных танизированных эритроцитов барана, сенсibilизированных очищенным концентрированным столбнячным анатоксином. Консервант – формальдегид.

Диагностикум имеет вид однородной взвеси коричневого цвета. При хранении образуются два слоя: прозрачная надосадочная жидкость и осадок коричневого цвета, разбивающийся при встряхивании.

Выпускается в комплекте с эритроцитами барана формализированными 50 %, эритроцитами барана контрольными, сывороткой противостолбнячной контрольной, фосфатно-солевым буферным раствором, фосфатно-солевым буферным раствором с твином.

Назначение

Диагностикум используется для определения содержания столбнячного антитоксина в сыворотках крови человека.

Способ применения

Определения содержания столбнячного антитоксина в сыворотке крови человека осуществляют в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) микрометодом или макрометодом.

Для проведения реакции необходимы следующие ингредиенты и оснащение:

- испытуемые сыворотки крови человека;
- 0,85 % свежеприготовленный раствор натрия хлорида (хч по ФС 42-2572-95) – для разведения испытуемых сывороток;
- фосфатно-солевой буферный раствор концентрированный (ФБР) – для разведения диагностикума и контрольных эритроцитов;

Взамен Инструкции, утвержденной 14.04.03 г.

Согласовано
Директор ФГУН
ГИСК им. Л. А. Тарасевича
Роспотребнадзора
Руководитель ЦОК МИБП


Н. В. Медведев

« 9 » 07 2008 г.