



Общество с ограниченной
ответственностью «Фламинго»

ИНН: 5003124557
КПП: 470601001
ОГРН:
1175027020300

+7 (812) 667-83-78
flamingo@flamingoproduct.ru

187342 Российская Федерация, Ленинградская область,
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1, оф. №
7

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Фламинго»



/Волокитин Н.М./

«21» сентября 2022 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(инструкция пользователя)
ПЕЛЕНКИ ВПИТЫВАЮЩИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

Технические условия

32.50.50-003-19127789-2022

Санкт-Петербург
2022

1 НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Пеленки выпускаются четырех видов:

- 1 Normal, четырех типов размеров: 40х60см, 60х60см, 60х90см, 180х90см.
- 2 Super, четырех типов размеров: 40х60см, 60х60см, 60х90см, 180х90см.
- 3 Super +, четырех типов размеров: 40х60см, 60х60см, 60х90см, 180х90см.
- 4 Luxe, четырех типов размеров: 40х60см, 60х60см, 60х90см, 180х90см.

Назначение: для использования при уходе за лежачими, послеоперационными больными, людьми с ограниченными возможностями передвижения, при проведении медицинских исследований, манипуляций и процедур в условиях лечебных учреждений, социальных учреждений, в домашних условиях, при транспортировке, а также в качестве дополнительной защиты при использовании подгузников в процессе ухода за больными, страдающими недержанием мочи и кала .

2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

2.1. Область применения.

Используются при уходе за лежачими, послеоперационными больными, людьми с ограниченными возможностями передвижения, при проведении медицинских исследований, манипуляций и процедур в условиях лечебных учреждений, социальных учреждений, в домашних условиях, при транспортировке, а также в качестве дополнительной защиты при использовании подгузников в процессе ухода за больными, страдающими недержанием мочи и кала .

2.2. Показания к применению:

- недержание мочи;
- частичная, или полная обездвиженность.

2.3. Противопоказания к применению: Индивидуальная непереносимость материала, из которого изготовлены пеленки.

2.4. Возможные побочные явления: возможно возникновение контактного дерматита на участках тела.

2.5. Предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

2.6. Условия применения

Пеленки могут применяться в лечебных условиях, лечебно-профилактических и социальных учреждениях, в домашних условиях, при транспортировке.

2.7. Характеристики (свойства)

Пленки выпускаются четырех видов:

- Normal, четырех типов размеров: 40х60см, 60х60см, 60х90см, 180х90см.
- Super, четырех типов размеров: 40х60см, 60х60см, 60х90см, 180х90см.
- Super +, четырех типов размеров: 40х60см, 60х60см, 60х90см, 180х90см.
- Luxe, четырех типов размеров: 40х60см, 60х60см, 60х90см, 180х90см.

2.7.1 Пленки должны быть изготовлены из материалов, указанных в таблице 1

Таблица 1

№ п/п	Наименование изделия, его частей	Наименование материала	Производитель
1	Покровный слой	Полипропиленовое нетканый материал, плотность 8-40г/м2	ООО «Нетканика», РФ
2	Сорбционный слой	ФЛАФФ-целлюлоза	ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» (Республика Беларусь)
		Суперабсорбент (полиакрилат натрия) (допускается его отсутствие)	Sumitomo Корея
3	Защитный слой	Полиэтиленовая пленка, плотность 10-30г/м2	POLIGOF RU, РФ
4	Скрепление слоев	Клей-расплав на основе термопластичных полимеров	Colquimica adhesives, Польша

2.7.2. Допускается использование материалов других производителей, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение пеленок.

2.7.3 Физико-механические показатели пеленок должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2

Таблица 2

	Наименование показателя	Величина
1	Абсорбционная способность должна быть не менее:	
	Normal 40x60см,	400 г
	Normal 60x60см,	800 г
	Normal 60x90см,	1200 г
	Normal 180x90см.	1200 г
	Super 40x60см,	500 г
	Super 60x60см,	900 г
	Super 60x90см,	1400 г
	Super 180x90см.	1400 г
	Super + 40x60см,	700 г
	Super + 60x60см,	1100 г
	Super + 60x90см,	1700 г
	Super + 180x90см.	1700 г
	Luxe 40x60см,	750 г
	Luxe 60x60см,	1500 г
	Luxe 60x90см,	2200 г
	Luxe 180x90см.	2200 г
2	Время впитывания, сек, не более	7

2.7.4. Пеленки могут выпускаться как с декоративной отделкой, выполненной в виде рисунка, нанесенного различными способами (печатью, тиснением и др.), так и без нее.

2.7.5. Поверхность пеленок не должна иметь механических повреждений, разрывов, масляных пятен, нарушений структуры защитного или покровного слоя, посторонних включений.

2.7.6. Покровный и защитный слои пеленки должны быть скреплены и предотвращать высыпания распушенной целлюлозы.

2.7.7. Пеленки в транспортной упаковке должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов при транспортировании по условиям хранения группа 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150.

2.7.8 Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение пеленок.

3. Техническое исполнение пеленок

3.1. Пеленки представляют собой комбинированные изделия, включающие покровный слой из нетканого материала, сорбционный слой из распушенной целлюлозы и защитный слой из водонепроницаемой пленки.

Допускается изготавливать пеленки с сорбционным слоем из распушенной целлюлозы и суперабсорбента.

3.2. Основные размеры пеленок, применительно к общему виду, приведены в таблице 3.

Таблица 3.

№	Типоразмер изделия, см	Длина изделия (А), мм	Ширина изделия (Б), мм	Длина сорбционного слоя (В), мм	Ширина сорбционного слоя (Г), мм
1	Пеленка 40х60	600±50	400±50	520±50	340±50
2	Пеленка 60х60	600±50	570±50	520±50	520±50
3	Пеленка 60х90	895±50	570±50	810±50	520±50
4	Пеленка 180х90	1800±150	895±50	520±50	810±50

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1. Подготовка пеленок

Для удобства транспортировки пеленки плотно складывают, и в таком спрессованном виде он попадает к потребителю. Освободив изделие от упаковки, полностью разверните пеленку, отвернув все сложенные элементы. Не прилагая чрезмерно больших усилий, потяните его за края, до полного исчезновения складок.

Разверните впитывающей поверхностью вверх, разместите в том месте, где это необходимо.

По мере загрязнения поменяйте пеленку на чистую

Использованную пеленку сверните и выбросьте в мусорное ведро. Не выбрасывайте использованное изделие в унитаз.

!Чтобы избежать протекания пеленки, следует четко придерживаться всех рекомендаций производителя и лечащего врача.

!Каждый раз после снятия использованной пеленки не забывайте проводить гигиеническую обработку.

4.2. При недержании кала, а также при наличии в местах контакта с пленкой нарушения целостности кожных покровов (язвы, пролежни, раны, ожоги и прочее) и/или раздражения, перед использованием пеленки, необходимо проконсультироваться с медицинским работником.

4.3. Самыми частыми причинами протекания являются:

- ошибки при использовании (несоблюдение инструкции);
- неверно подобранный размер;

- неправильный выбор степени впитываемости.

4.4. Менять пеленку нужно каждые 3-4 часа либо после очередной дефекации. В тех случаях, когда такая частая замена не возможна, следует отдать предпочтение пеленкам повышенной степени впитываемости.

4.5. Пеленки – прекрасное средство личной гигиены для тех, кто потерял способность контролировать определенные функции своего организма. Они помогают облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями, делая ее максимально комфортной.

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Пеленки хранят в упаковке предприятия – изготовителя в условиях хранения по группе 1 ГОСТ 15150. Пеленки должны храниться в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +40°C, относительной влажности воздуха не более 75 %.

5.2. Пеленки должны храниться на складах поставщика и потребителя (кроме складов железнодорожных станций), в упаковке предприятия – изготовителя.

5.3. Не допускается совместное хранение пеленок с химическими веществами.

5.4. Срок годности 5 лет, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения

5.5. После окончания срока годности пеленки подлежат утилизации, как бытовые отходы.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование - по ГОСТ 6658 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки - по группе 5 ГОСТ 15150.

7 УТИЛИЗАЦИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ

7.1. Утилизация пеленок должна осуществляться в соответствии правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также СанПиН 2.1.7.2790.

7.2. В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790, пеленки относятся к классу А – эпидемиологические безопасные отходы.

7.3. Утилизация отходов материалов – согласно СанПиН 2.1.7.1322.

7.4. После использования или по истечении установленного срока годности пеленки должны быть утилизированы как твердые бытовые отходы.

7.5. Уничтожение производится посредством захоронения.

8 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Претензии в установленном порядке предъявляются ООО «Фламинго» по адресу: Россия, 187342, Ленинградская область, Кировский район, город Кировск, Набережная улица, дом 1, офис 7 , телефон: +7(812)667-83-78. электронная почта: flamingo@flamingoproduct.ru.

9 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие пеленок требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

9.2. Срок годности 5 лет, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.3. Пеленки должны храниться в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +40°C, относительной влажности воздуха не более 75 %.

Производитель: ООО «Фламинго» по адресу: Россия, 187342, Ленинградская область, Кировский район, город Кировск, Набережная улица, дом 1, офис 7 , телефон: +7(812)667-83-78. электронная почта: flamingo@flamingoproduct.ru.

Регистрационное удостоверение: № _____



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 7 (ссылка) листов

Должность _____

Подпись [подпись] / Володин КМ

« 19 » 05 20 23 года М.П.