

УТВЕРЖДАЮ

Директор

АО «НПП «ИНТЕРОКО»

В.Л. Морозов

«08» февраля 2021 г.



Инструкция по применению (для потребителя)

**Контейнеры с антикоагулянтами для афереза по ТУ 32.50.50-008-73064893-2020
стерильные, однократного применения, в вариантах исполнения:**

**Контейнер с антикоагулянтом Натрия цитрат 4% с заглушкой и портом для
полимерной иглы (твист-офф), объемом 250 мл**

**Контейнер с антикоагулянтом Натрия цитрат 4% с инъекционным узлом и портом
для полимерной иглы (твист-офф), объемом 250 мл**

**Контейнер с антикоагулянтом Натрия цитрат 4% с заглушкой и портом для
полимерной иглы (твист-офф), объемом 300 мл**

**Контейнер с антикоагулянтом Натрия цитрат 4% с инъекционным узлом и портом
для полимерной иглы (твист-офф), объемом 300 мл**

Описание медицинского изделия

Контейнер с антикоагулянтом Натрия цитрат 4% представляет собой прозрачный полимерный контейнер, заполненный прозрачной или слегка желтоватой жидкостью. Контейнер имеет порт для полимерной иглы, с помощью которого контейнер можно присоединить к системе для аппаратного афереза.

Состав антикоагулянта Натрия цитрат 4%:

- лимонная кислота безводная – от 0 до 0,015 г;
- натрия цитрат дигидрат – 45,6 г;
- вода для инъекций – до 1000 мл;
- pH раствора – не менее 6,4 и не более 7,5*;

* растворы хлористоводородной кислоты или гидроксида натрия могут быть использованы до доведения pH.

Назначение

Предназначены для антикоагуляции и гемоконсервации при получении компонентов крови при помощи системы для афереза

Описание антикоагулянта

Антикоагулянт Натрия цитрат 4% используется для предотвращения гемокоагуляции путём связывания катионов Ca^{2+} (IV плазменный фактор) анионами цитрата. Цитрат натрия поддерживает буферную систему крови и улучшает кислородно-транспортную функцию эритроцитов.

Побочные эффекты

Во время процедуры афереза быстрая инфузия антикоагулянтов, в состав которых входит цитрат, может привести к возникновению цитратной реакции. Цитратная реакция может проявляться в ощущении «покалывания», которое чаще всего локализуется вокруг рта донора. Также возможно повышение тонуса мышц или возникновения тремора, появление ощущения напряжения в груди и озноба. При появлении подобных симптомов нужно уменьшить скорость возврата донору компонентов крови. Причина цитратной реакции: развитие умеренной гипокальцемии в результате хелирования кальция неметаболизированным цитратом.

Для борьбы с цитратной реакцией можно использовать глюконат кальция.

Обратите внимание

- Проверьте целостность изделия и его упаковки перед использованием. Если изделие или его упаковка повреждены – не используйте.
- Проверьте срок годности изделия. Не используйте изделие после истечения срока годности.
- Проверьте название контейнера с антикоагулянтом и убедитесь, что выбранный контейнер подходит для запланированной вами процедуры.
- Проверьте прозрачность контейнера с антикоагулянтом. Если раствор антикоагулянта мутный, не используйте его.
- При вскрытии упаковки и использовании контейнера избегайте контакта с острыми предметами.
- Постарайтесь использовать контейнер с антикоагулянтом сразу после извлечения из упаковки.
- После окончания процедуры утилизируйте упаковку и оставшийся антикоагулянт. Не используйте изделие повторно.
- Не стерилизуйте изделие повторно.
- Не использовать для прямой инфузии пациенту.

Применение

Контейнер с антикоагулянтом Натрия цитрат 4% предназначен для применения в стационарных условиях в учреждениях Службы крови, медицинских учреждениях и в условиях выездных бригад.

Контейнер с антикоагулянтом Натрия цитрат 4% может быть использован при получении плазмы методом автоматического аппаратного афереза.

Для проведения процедуры используют аппараты и совместимые с ними расходные материалы. Контейнер с антикоагулянтом Натрия цитрат 4% присоединяйте к расходному материалу через порт для полимерной иглы.

Перед использованием аппаратов и расходных материалов для афереза ознакомьтесь с инструкциями по применению.

Условия хранения и эксплуатации

Контейнер с антикоагулянтом Натрия цитрат 4% рекомендуется хранить при:

температуре воздуха от +1 до +35 °C;

относительной влажности воздуха 35-85%;

атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа или 630-800 мм рт. ст.

Контейнер с антикоагулянтом Натрия цитрат 4% рекомендуется использовать при:

температуре воздуха от +18 до +25 °C;

относительной влажности воздуха 35-85%;

атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа или 630-800 мм рт. ст.

Символы



Утилизация

После использования изделие должно быть утилизировано как отходы класса Б «Эпидемиологически опасные отходы».

После истечения срока годности или при повреждении упаковки изделие должно быть утилизировано как отходы класса А «Эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам».

Гарантийный срок годности – 2 года со дня стерилизации.

По дополнительному запросу может быть представлена инструкция по применению (для специалиста).

В случае возникновения вопросов, связанных с применением изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться:

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ИНТЕРОКО» (АО «НПП «ИНТЕРОКО»).

Адрес: 140080, Московская область, г. Лыткарино, поселок Тураево, строение 8, зд. 121.

Тел. (495) 552 47 66, 555 45 88, e-mail: interokoreg@yandex.ru,

Место для QR-кода

"08" 02 2021г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

АО «НПЦ «ИНТЕРОКО»

В.П. Морозов

«08» февраля 2021 г.



Инструкция по применению (для потребителя)

**Контейнеры с антикоагулянтами для афереза по ТУ 32.50.50-008-73064893-2020
стерильные, однократного применения, в вариантах исполнения**

- Контейнер с антикоагулянтом ACD-A с портом для полимерной иглы (твист-офф) и разъемом Луер с наружной резьбой, объемом 50 мл
- Контейнер с антикоагулянтом ACD-A с портом для полимерной иглы (твист-офф) и разъемом Луер с внутренней резьбой, объемом 50 мл
- Контейнер с антикоагулянтом ACD-A с портом для полимерной иглы (твист-офф) и разъемом Луер с наружной резьбой, объемом 250 мл
- Контейнер с антикоагулянтом ACD-A с портом для полимерной иглы (твист-офф) и разъемом Луер с внутренней резьбой, объемом 250 мл
- Контейнер с антикоагулянтом ACD-A с портом для полимерной иглы (твист-офф) и разъемом Луер с наружной резьбой, объемом 500 мл
- Контейнер с антикоагулянтом ACD-A с портом для полимерной иглы (твист-офф) и разъемом Луер с внутренней резьбой, объемом 500 мл
- Контейнер с антикоагулянтом ACD-A с портом для полимерной иглы (твист-офф) и разъемом Луер с наружной резьбой, объемом 750 мл
- Контейнер с антикоагулянтом ACD-A с портом для полимерной иглы (твист-офф) и разъемом Луер с внутренней резьбой, объемом 750 мл
- Контейнер с антикоагулянтом ACD-A с портом для полимерной иглы (твист-офф) и разъемом Луер с наружной резьбой, объемом 800 мл
- Контейнер с антикоагулянтом ACD-A с портом для полимерной иглы (твист-офф) и разъемом Луер с внутренней резьбой, объемом 800 мл
- Контейнер с антикоагулянтом ACD-A с портом для полимерной иглы (твист-офф) и разъемом Луер с наружной резьбой, объемом 1000 мл
- Контейнер с антикоагулянтом ACD-A с портом для полимерной иглы (твист-офф) и разъемом Луер с внутренней резьбой, объемом 1000 мл

Описание медицинского изделия

Контейнер с антикоагулянтом ACD-A представляет собой прозрачный полимерный контейнер, заполненный прозрачной или слегка желтоватой жидкостью. Контейнер может иметь луер с наружной резьбой, луер с внутренней резьбой или порт для полимерной иглы, с помощью которых контейнер можно присоединить к системе для аппаратного афереза.

Состав антикоагулянта ACD-A:

- глюкоза моногидрат – 24,5 г;
- лимонная кислота безводная – 7,3 г;
- натрия цитрат дигидрат - 25,1 г;

- вода для инъекций – до 1000 мл;
- pH раствора – не менее 4,7 и не более 5,3*;

* растворы хлористоводородной кислоты или гидроксида натрия могут быть использованы до доведения pH

Назначение

Предназначены для антикоагуляции и гемоконсервации при получении компонентов крови при помощи системы для афереза

Описание антикоагулянта

Антикоагулянт ACD-A может быть использован в качестве антикоагулянта и гемоконсерванта при получении компонентов крови: тромбоцитов, реже – плазмы. Препятствует сворачиванию крови. Обеспечивает необходимые питательные вещества для метаболизма и стабилизации клеток во время хранения компонентов крови. Предотвращает свертывание крови путем подавления нескольких зависимых от кальция стадий коагуляционной системы.

Побочные эффекты

Во время процедуры афереза быстрая инфузия антикоагулянтов, в состав которых входит цитрат, может привести к возникновению цитратной реакции. Цитратная реакция может проявляться в ощущении «покалывания», которое чаще всего локализуется вокруг рта донора. Также возможно повышение тонуса мышц или возникновения тремора, появление ощущения напряжения в груди и озноба. При появлении подобных симптомов нужно уменьшить скорость возврата донору компонентов крови. Причина цитратной реакции: развитие умеренной гипокальцемии в результате хелирования кальция неметаболизированным цитратом.

Для борьбы с цитратной реакцией можно использовать глюконат кальция.

Обратите внимание

- Проверьте целостность изделия и его упаковки перед использованием. Если изделие или его упаковка повреждены – не используйте.
- Проверьте срок годности изделия. Не используйте изделие после истечения срока годности.
- Проверьте название контейнера с антикоагулянтom и убедитесь, что выбранный контейнер подходит для запланированной вами процедуры.
- Проверьте прозрачность контейнера с антикоагулянтom. Если раствор антикоагулянта мутный, не используйте его.
- При вскрытии упаковки и использовании контейнера избегайте контакта с острыми предметами.
- Постарайтесь использовать контейнер с антикоагулянтom сразу после извлечения из упаковки.
- После окончания процедуры утилизируйте упаковку и оставшийся антикоагулянт. Не используйте изделие повторно.
- Не стерилизуйте изделие повторно.
- Не использовать для прямой инфузии пациенту.

Применение

Контейнер с антикоагулянтом ACD-A предназначен для применения в стационарных условиях в учреждениях Службы крови, медицинских учреждениях и в условиях выездных бригад.

Контейнер с антикоагулянтом ACD-A может быть использован при получении плазмы крови или тромбоцитов методом автоматического аппаратного афереза.

Для проведения процедуры используют аппараты и совместимые с ними расходные материалы. Контейнер с антикоагулянтом ACD-A присоединяйте к расходному материалу через луер с наружной резьбой, луер с внутренней резьбой или порт для полимерной иглы.

Перед использованием аппаратов и расходных материалов для афереза ознакомьтесь с инструкциями по применению.

Условия хранения и эксплуатации

Контейнер с антикоагулянтом ACD-A рекомендуется хранить при:

- температуре воздуха от +1 до +35 °C;
- относительной влажности воздуха 35-85%;
- атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа или 630-800 мм рт. ст.

Контейнер с антикоагулянтом ACD-A рекомендуется использовать при:

- температуре воздуха от +18 до +25 °C;
- относительной влажности воздуха 35-85%;
- атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа или 630-800 мм рт. ст.

Символы



Утилизация

После использования изделие должно быть утилизировано как отходы класса Б «Эпидемиологически опасные отходы».

После истечения срока годности или при повреждении упаковки изделие должно быть утилизировано как отходы класса А «Эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам».

Гарантийный срок годности – 2 года со дня стерилизации.

По дополнительному запросу может быть представлена инструкция по применению (для специалиста).

В случае возникновения вопросов, связанных с применением изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться:

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ИНТЕРОКО» (АО «НПП «ИНТЕРОКО»).

Адрес: 140080, Московская область, г. Лыткарино, поселок Тураево, строение 8, зд. 121.

Тел. (495) 552 47 66, 555 45 88, e-mail: interokoreg@yandex.ru.

Место для QR-кода

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 1 лист(ов)

Директор АО «НП «ИНТЕРОКО»

Морозов В.П.

29.01 2021г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

АО «НПП «ИНТЕРОКО»

В.П. Морозов

«08» февраля 2021 г.



Инструкция по применению (для потребителя)

Контейнеры с антикоагулянтами для афереза по ТУ 32.50.50-008-73064893-2020 стерильные, однократного применения, в вариантах исполнения

- Контейнер с антикоагулянтом Тромбосол с трубкой под стерильное спайвание и
разъемом Луер с внутренней резьбой, объемом 200 мл**
- Контейнер с антикоагулянтом Тромбосол с трубкой под стерильное спайвание и
разъемом Луер с внутренней резьбой, объемом 220 мл**
- Контейнер с антикоагулянтом Тромбосол с трубкой под стерильное спайвание и
разъемом Луер с внутренней резьбой, объемом 250 мл**
- Контейнер с антикоагулянтом Тромбосол с трубкой под стерильное спайвание и
разъемом Луер с внутренней резьбой, объемом 280 мл**
- Контейнер с антикоагулянтом Тромбосол с трубкой под стерильное спайвание и
разъемом Луер с внутренней резьбой, объемом 300 мл**
- Контейнер с антикоагулянтом Тромбосол с трубкой под стерильное спайвание и
разъемом Луер с внутренней резьбой, объемом 500 мл**
- Контейнер с антикоагулянтом Тромбосол с трубкой под стерильное спайвание и
разъемом Луер с внутренней резьбой, объемом 550 мл.**

Описание медицинского изделия

Контейнер с антикоагулянтом Тромбосол представляет собой прозрачный полимерный контейнер, заполненный прозрачной или слегка желтоватой жидкостью. Контейнер имеет разъем луер с внутренней резьбой и трубку, закрытую на конце заглушкой. С помощью разъема луер контейнер можно присоединить к системе для аппаратной заготовки тромбоцитов. С помощью трубки с заглушкой контейнер с антикоагулянтом можно стерильно подпаять к системе для пулирования тромбоцитов.

Состав антикоагулянта Тромбосол:

- натрия цитрат дигидрат – 3,18 г;
- натрия ацетат тригидрат – 4,42 г;
- натрия дигидрофосфат дигидрат – 1,05 г;
- натрия гидрофосфат дигидрат – 3,82 г;
- хлорид калия – 0,37 г;
- хлорид магния гексагидрат – 0,30 г;
- хлорид натрия – 4,05 г;
- вода для инъекций – до 1000 мл;
- pH раствора – не менее 7,0 и не более 7,5.

Назначение

Предназначены для антикоагуляции и гемоконсервации при получении компонентов крови при помощи системы для афереза

Описание антикоагулянта

Тромбосол предназначен для частичной замены плазмы при заготовке или хранении тромбоцитов. Тромбоциты могут быть получены из доз цельной крови или при помощи афереза. Рекомендуется объемное отношение: 80% Тромбосола, 20% плазмы.

Тромбосол позволяет хранить тромбоциты при температуре от 20 до 24°C и постоянном помешивании до 7 дней.

Содержит оптимальное количество цитрата, который может служить для сохранения морфофункциональной полноценности тромбоцитов в течение срока хранения и препятствовать коагуляции.

Тромбосол может быть использован для ресуспендирования криоконсервированных размороженных тромбоцитов. Для размороженных тромбоцитов рекомендуется объемное отношение: 90% Тромбосола, 10% размороженных тромбоцитов.

Побочные эффекты

Не известны побочные эффекты, связанные с использованием антикоагулянтом Тромбосол.

Обратите внимание

- Проверьте целостность изделия и его упаковки перед использованием. Если изделие или его упаковка повреждены – не используйте.
- Проверьте срок годности изделия. Не используйте изделие после истечения срока годности.
- Проверьте название контейнера с антикоагулянтом и убедитесь, что выбранный контейнер подходит для запланированной вами процедуры.
- Проверьте прозрачность контейнера с антикоагулянтом. Если раствор антикоагулянта мутный, не используйте его.
- При вскрытии упаковки и использовании контейнера избегайте контакта с острыми предметами.
- Постарайтесь использовать контейнер с антикоагулянтом сразу после извлечения из упаковки.
- После окончания процедуры утилизируйте упаковку и оставшийся антикоагулянт. Не используйте изделие повторно.
- Не стерилизуйте изделие повторно.
- Не использовать для прямой инфузии пациенту

Применение

Контейнер с антикоагулятом Тромбосол предназначен для применения в стационарных условиях в учреждениях Службы крови, медицинских учреждениях и в условиях выездных бригад.

Контейнер с антикоагулянтом Тромбосол может быть использован при получении тромбоцитов методом пулирования лейкотромбослоя (ЛТС) или методом автоматического аппаратного тромбоцитафереза.

При пулировании ЛТС может быть использован специальный расходный материал – системы для пулирования. Контейнер с антикоагулянтом Тромбосол стерильно присоединяйте через трубку с заглушкой к системе для пулирования с помощью устройства для стерильного спаивания магистралей либо через разъем луер с внутренней резьбой, если это предусмотрено конструкцией системы для пулирования тромбоцитов.

Для проведения тромбоцитафереза используют аппараты и совместимые с ними расходные материалы. Контейнер с антикоагулянтом Тромбосол присоединяйте к расходному материалу для тромбоцитафереза через разъем луер с внутренней резьбой.

Перед использованием систем для пулирования, аппаратов и расходных материалов для афереза ознакомьтесь с инструкциями по применению.

Условия хранения и эксплуатации

Контейнер с антикоагулянтом Тромбосол рекомендуется хранить при:

температуре воздуха от +1 до +35 °С;

относительной влажности воздуха 35-85%;

атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа или 630-800 мм рт.ст.

Контейнер с антикоагулянтом Тромбосол рекомендуется использовать при:

температуре воздуха от +18 до +25 °С;

относительной влажности воздуха 35-85%;

атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа или 630-800 мм рт.ст.

Символы



Утилизация

После использования изделие должно быть утилизировано как отходы класса Б «Эпидемиологически опасные отходы».

После истечения срока годности или при повреждении упаковки изделие должно быть утилизировано как отходы класса А «Эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам».

Гарантийный срок годности – 2 года со дня стерилизации.

По дополнительному запросу может быть представлена инструкция по применению (для специалиста).

В случае возникновения вопросов, связанных с применением изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться:

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ИНТЕРОКО» (АО «НПП «ИНТЕРОКО»).

Адрес: 140080, Московская область, г. Лыткарино, поселок Тураево, строение 8, зд. 103.

Тел. (495) 552 47 66, 555 45 88, e-mail: interokoreg@yandex.ru.

Место для QR-кода

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 лист(ов)

Директор АО «НП «ИНТЕРОКО»

Морозов В.П.

"05" 02 2021г.





УТВЕРЖДАЮ

Директор

АО «НПП ИНТЕРОКО»

В.П. Морозов

«08» февраля 2021 г.

Инструкция по применению (для потребителя)

**Контейнеры с антикоагулянтами для афереза по ТУ 32.50.50-008-73064893-2020
стерильные, однократного применения, в вариантах исполнения:**

- Контейнер с антикоагулянтом CPD-50 с разъемом Луер с внутренней резьбой,
объемом 150 мл**
- Контейнер с антикоагулянтом CPD-50 с портом для полимерной иглы (флип-офф),
объемом 150 мл**
- Контейнер с антикоагулянтом CPD-50 с заглушкой и портом для полимерной иглы
(твист-офф), объемом 150 мл**
- Контейнер с антикоагулянтом CPD-50 с инъекционным узлом и портом для
полимерной иглы (твист-офф), объемом 150 мл**
- Контейнер с антикоагулянтом CPD-50 с разъемом Луер с внутренней резьбой,
объемом 250 мл**
- Контейнер с антикоагулянтом CPD-50 с портом для полимерной иглы (флип-офф),
объемом 250 мл**
- Контейнер с антикоагулянтом CPD-50 с заглушкой и портом для полимерной иглы
(твист-офф), объемом 250 мл**
- Контейнер с антикоагулянтом CPD-50 с инъекционным узлом и портом для
полимерной иглы (твист-офф), объемом 250 мл**
- Контейнер с антикоагулянтом CPD-50 с разъемом Луер с внутренней резьбой,
объемом 300 мл**
- Контейнер с антикоагулянтом CPD-50 с портом для полимерной иглы (флип-офф),
объемом 300 мл**
- Контейнер с антикоагулянтом CPD-50 с заглушкой и портом для полимерной иглы
(твист-офф), объемом 300 мл**
- Контейнер с антикоагулянтом CPD-50 с инъекционным узлом и портом для
полимерной иглы (твист-офф), объемом 300 мл.**

Описание медицинского изделия

Контейнер с антикоагулянтом CPD-50 представляет собой прозрачный полимерный контейнер, заполненный прозрачной или слегка желтоватой жидкостью. Контейнер может иметь луер с внутренней резьбой или порт для полимерной иглы, с помощью которых контейнер можно присоединить к системе для аппаратного афереза.

Состав антикоагулянта CPD-50:

- лимонная кислота безводная – 4,48 г;
- глюкоза моногидрат – 50,0 г;

- натрия дигидрофосфат дигидрат – 4,26 г;
- натрия цитрат дигидрат – 39,5 г;
- вода для инъекций – до 1000 мл;
- pH раствора – не менее 5,3 и не более 5,9*;

* растворы хлористоводородной кислоты или гидроксида натрия могут быть использованы до доведения pH.

Назначение

Предназначены для антикоагуляции и гемоконсервации при получении компонентов крови при помощи системы для афереза

Описание антикоагулянта

Антикоагулянт CPD-50 используется для предотвращения свертывания крови и оказывает гемоконсервирующее действие. Глюкоза, содержащаяся в антикоагулянте, служит для поддержания метаболизма красных кровяных клеток, а фосфаты поддерживают стабильность pH.

Побочные эффекты

Во время процедуры афереза быстрая инфузия антикоагулянтов, в состав которых входит цитрат, может привести к возникновению цитратной реакции. Цитратная реакция может проявляться в ощущении «покалывания», которое чаще всего локализуется вокруг рта донора. Также возможно повышение тонуса мышц или возникновения тремора, появление ощущения напряжения в груди и озноба. При появлении подобных симптомов нужно уменьшить скорость возврата донору компонентов крови. Причина цитратной реакции: развитие умеренной гипокальцемии в результате хелирования кальция неметаболизированным цитратом.

Для борьбы с цитратной реакцией можно использовать глюконат кальция.

Обратите внимание

- Проверьте целостность изделия и его упаковки перед использованием. Если изделие или его упаковка повреждены – не используйте изделие.
- Проверьте срок годности контейнера. Не используйте контейнер после истечения срока годности.
- Проверьте название контейнера с антикоагулянтom и убедитесь, что выбранный контейнер подходит для запланированной вами процедуры.
- Проверьте прозрачность контейнера с антикоагулянтom. Если раствор антикоагулянта мутный, не используйте его.
- При вскрытии упаковки и использовании контейнера избегайте контакта с острыми предметами.
- Постарайтесь использовать контейнер с антикоагулянтom сразу после извлечения из упаковки.
- После окончания процедуры утилизируйте упаковку и оставшийся антикоагулянт. Не используйте изделие повторно.
- Не стерилизуйте изделие повторно.
- Не использовать для прямой инфузии пациенту.

Применение

Контейнер с антикоагулянтом CPD-50 предназначен для применения в стационарных условиях в учреждениях Службы крови, медицинских учреждениях и в условиях выездных бригад.

Контейнер с антикоагулянтом CPD-50 может быть использован при получении эритроцитов методом автоматического аппаратного афереза.

Для проведения процедуры используют аппараты и совместимые с ними расходные материалы. Контейнер с антикоагулянтом CPD-50 присоединяйте к расходному материалу через луер с внутренней резьбой или порт для полимерной иглы.

Перед использованием аппаратов и расходных материалов для афереза ознакомьтесь с инструкциями по применению.

Условия хранения и эксплуатации

Контейнер с антикоагулянтом CPD-50 рекомендуется хранить при:

- температуре воздуха от +1 до +35 °C;
- относительной влажности воздуха 35-85%;
- атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа или 630-800 мм рт. ст.

Контейнер с антикоагулянтом CPD-50 рекомендуется использовать при:

- температуре воздуха от +18 до +25 °C;
- относительной влажности воздуха 35-85%;
- атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа или 630-800 мм рт. ст.

Символы



Утилизация

После использования изделие должно быть утилизировано как отходы класса Б «Эпидемиологически опасные отходы».

После истечения срока годности или при повреждении упаковки изделие должно быть утилизировано как отходы класса А «Эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам».

Гарантийный срок годности – 2 года со дня стерилизации.

По дополнительному запросу может быть представлена инструкция по применению (для специалиста).

В случае возникновения вопросов, связанных с применением изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться:

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ИНТЕРОКО» (АО «НПП «ИНТЕРОКО»).

Адрес: 140080, Московская область, г. Лыткарино, поселок Тураево, строение 8, зд. 121.

Тел. (495) 552 47 66, 555 45 88, e-mail: interokoreg@yandex.ru.

Место для QR-кода

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 лист(ов)

Директор АО «НПН «ИНТЕРОКО»

Морозов В.П.

" 02 " 2021г.

