

7A

公 证 书

中华人民共和国广东省佛山市顺德公证处

A & I Industries Ltd Shunde Foshan

Address: Liandu Industrial Park, Le Liu Town, Shunde District, Foshan City, China
Tel: +86-757-23662005 Fax: +86-757-25631224

«I CERTIFY»

A & I Industries Ltd Shunde Foshan
Liandu Industrial Park, Le Liu Town,
Shunde District, Foshan City, China

Director Huang Weichen

黃偉誠

04 08 2021 г.



OPERATING DOCUMENTS TO THE MEDICAL DEVICE

Кресло-коляска инвалидная Ortonica

公 证 书

(2021)粤佛顺德第 9294 号

申请人：佛山市顺德区安爱工业有限公司

住所：佛山市顺德区勒流镇连杜工业区

统一社会信用代码：914406066176528775

法定代表人：黄伟诚，男，一九七二年九月二十八日出生，
台湾居民来往大陆通行证号码：01653781。

公证事项：签名、印鉴

兹证明佛山市顺德区安爱工业有限公司的法定代表人黄伟诚于二〇二一年四月八日来到我处，在本公证员的面前，在前面的外文文件上签名并加盖其公司印鉴。

中华人民共和国广东省佛山市顺德公证处

公证员：

吴丹丹



445214438

NOTARIAL CERTIFICATE

(2021) YFSD No.9294

Applicant: A & I Industries Ltd Shunde Foshan

Location: Liandu Industrial Park, Leliu Town, Shunde District,
Foshan City

Unified Social Credit Code: 914406066176528775

Legal representative: Huang Weicheng, male, born on September
28, 1972, Mainland Travel Permit for Taiwan Residents No.:
01653781.

Issue under notarization: signature, seal

This is to certify that Huang Weicheng, the legal representative of
A & I Industries Ltd Shunde Foshan, came to our office on April
8, 2021, affixed his signature and the company seal on the
foregoing foreign language document in the presence of me, the
notary public.

Notary: Wu Dandan

Shunde Notary Public Office of
Foshan City, Guangdong Province
The People's Republic of China
April 13, 2021

IV45258286

公 证 书

(2021)粤佛顺德第 9295 号

申请人：佛山市顺德区安爱工业有限公司

住所：佛山市顺德区勒流镇连杜工业区

统一社会信用代码：914406066176528775

法定代表人：黄伟诚，男，一九七二年九月二十八日出生，
台湾居民来往大陆通行证号码：01653781。

公证事项：译文与原本相符

兹证明前面的英文译本内容与中文文本内容相符。

中华人民共和国广东省佛山市顺德公证处

公证员：

吴丹丹



IV45214439

NOTARIAL CERTIFICATE

(2021) YFSD No.9295

Applicant: A & I Industries Ltd Shunde Foshan

Location: Liandu Industrial Park, Leliu Town, Shunde District,
Foshan City

Unified Social Credit Code: 914406066176528775

Legal representative: Huang Weicheng, male, born on September
28, 1972, Mainland Travel Permit for Taiwan Residents No.:
01653781.

Issue under notarization: Translation conforms to the original
document

This is to certify that the foregoing English translation conforms
to the original document in Chinese.

Notary: Wu Dandan
Shunde Notary Public Office of
Foshan City, Guangdong Province
The People's Republic of China
April 13, 2021

IV45258288

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кресло-коляска инвалидная Ortonica

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации включает в себя сведения, необходимые для изучения конструкции и правил эксплуатации, транспортирования и хранения медицинского изделия Кресло-коляска инвалидная Ortonica.

Прежде чем приступить к использованию Кресла-коляски инвалидной Ortonica, необходимо изучить и понять содержание настоящего руководства по эксплуатации.

1. Наименование медицинского изделия

Наименование – «Кресло-коляска инвалидная Ortonica» (далее по тексту «Кресло-коляска»).

Варианты исполнения и комплектность медицинского изделия приведены в Разделе 7.

Используемые сокращения:

- 1) Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base (200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700) (далее – «Кресло-коляска Ortonica Base», варианты исполнения: «Base 200», «Base 250», «Base 300», «Base 350», «Base 400», «Base 450», «Base 500», «Base 550», «Base 600», «Base 650», «Base 700»), пункты 1.1-1.11 в разделе 7;
- 2) Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite (100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700) (далее – «Кресло-коляска Ortonica Base lite», варианты исполнения: «Base Lite 100», «Base Lite 150», «Base Lite 200», «Base Lite 250», «Base Lite 300», «Base Lite 350», «Base Lite 400», «Base Lite 450», «Base Lite 500», «Base Lite 550», «Base Lite 600», «Base Lite 650», «Base Lite 700»), пункты 2.1-2.13 в разделе 7;
- 3) Кресло-коляска инвалидная эргономичная Ortonica Desk (1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000) (далее – «Кресло-коляска Ortonica Desk», варианты исполнения: «Desk 1000», «Desk 2000», «Desk 3000», «Desk 4000», «Desk 5000», «Desk 6000», «Desk 7000», «Desk 8000»), пункты 3.1-3.8 в разделе 7;
- 4) Кресло-коляска инвалидная с откидной спинкой Ortonica Recline (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800) (далее – «Кресло-коляска Ortonica Recline», варианты исполнения: «Recline 100», «Recline 200», «Recline 300», «Recline 400», «Recline 500», «Recline 600», «Recline 700», «Recline 800»), пункты 4.1-4.8 в разделе 7;
- 5) Кресло-коляска инвалидная с независимой подвеской Ortonica Delux (600, 650, 700, 750, 800, 850, 900) (далее – «Кресло-коляска Ortonica Delux», варианты исполнения: «Delux 600», «Delux 650», «Delux 700», «Delux 750», «Delux 800», «Delux 850», «Delux 900»), пункты 5.1-5.7 в разделе 7;
- 6) Кресло-коляска инвалидная малогабаритная Ortonica Home (50, 60, 70, 80, 90, 100, 110) (далее – «Кресло-коляска Ortonica Home», варианты исполнения: «Home 50», «Home 60», «Home 70», «Home 80», «Home 90», «Home 100», «Home 110»), пункты 6.1-6.7 в разделе 7;
- 7) Кресло-коляска инвалидная детская повышенной комфортности Ortonica Puma (100, 200, 300, 400, 500, 600) (далее – «Кресло-коляска Ortonica Puma», варианты исполнения: «Puma 100», «Puma 200», «Puma 300», «Puma 400», «Puma 500», «Puma 600»), пункты 7.1-7.6 в разделе 7;
- 8) Кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort (100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700) (далее – «Кресло-коляска Ortonica Comfort», варианты исполнения: «Comfort 100», «Comfort 150», «Comfort 200», «Comfort

250», «Comfort 300», «Comfort 350», «Comfort 400», «Comfort 450», «Comfort 500», «Comfort 550», «Comfort 600», «Comfort 650», «Comfort 700»), пункты 8.1-8.13 в разделе 7;

9) Кресло-коляска инвалидная с дополнительным механизмом управления одной рукой Ortonica Control One (100, 200, 300, 400, 500, 600) (далее – «Кресло-коляска Ortonica Control One»), варианты исполнения: «Control One 100», «Control One 200», «Control One 300», «Control One 400», «Control One 500», «Control One 600»), пункты 9.1-9.6 в разделе 7;

10) Кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life (1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000) (далее – «Кресло-коляска Ortonica Active Life », варианты исполнения: «Active Life 1000», «Active Life 2000», «Active Life 3000», «Active Life 4000», «Active Life 5000», «Active Life 6000», «Active Life 7000», «Active Life 8000», «Active Life 9000»), пункты 10.1-10.9 в разделе 7.

2. Производитель, уполномоченный представитель

Производитель:

«A & I Industries Ltd Shunde Foshan», China

(«А энд Ай Индастриз Лтд Шуньдэ Фошань»), Китай

Адрес места производства:

Lian Du Industry Park, Le Liu Town,
Shun De District, Fo Shan City,
Guangdong, China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортоника»

105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 2, кв. 14

Тел: +7 (495) 648-60-42

Email: info@ortonica.ru

3. Назначение медицинского изделия

Кресло-коляска предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на дорогах с твердым покрытием.

4. Показания, противопоказания к применению, потенциальные потребители

Показания:

Показаниями к применению Кресла-коляски являются следующие диагнозы:

- стойкие деформации или заболевания нижних конечностей, таза или позвоночника;
- паралич, значительно выраженный, выраженный парез обеих нижних конечностей;
- болезни нервной системы, органов пищеварения, мочеполовой системы, злокачественные новообразования;
- ампутация нижних конечностей;
- повреждения или деформация конечностей;
- детский церебральный паралич;
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания

Запрещается использовать Кресло-коляску в тех случаях, когда присутствует один из следующих диагнозов:

- стекловидные кости;
- тяжелая контрактура суставов таза, коленного или голеностопа;
- болезни сердца и кровеносной системы;
- невозможность сохранения сидячего положения;
- потеря функциональности обеих рук;
- ограниченная или недостаточная способность к ориентации;
- наркотическое или алкогольное воздействие;
- психические расстройства;
- тяжелые нарушения вестибулярного аппарата;
- повышенное беспокойство, которое может спровоцировать спазмы.

Потенциальные потребители

Потенциальными потребителями Кресла-коляски являются инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей.

5. Классификация медицинского изделия

Кресло-коляска инвалидная Ortonica классифицируется как изделие Класса I в соответствии с Приложением IX, Правило 6 Директивы по медицинским изделиям 93/42/ЕЭС.

В зависимости от массы тела пользователя, как установлено в ISO 7176-5 Кресло-коляска относится к следующим группам:

- группа пользователей II: пользователи с массой тела от 50 до 125 кг (варианты исполнения: «Кресло-коляска Ortonica Puma»);

- группа пользователей III: с массой тела свыше 125 кг (варианты исполнения: «Кресло-коляска Ortonica Base», «Кресло-коляска Ortonica Base lite», «Кресло-коляска Ortonica Desk», «Кресло-коляска Ortonica Recline», «Кресло-коляска Ortonica Delux», «Кресло-коляска Ortonica Home», «Кресло-коляска Ortonica Comfort», «Кресло-коляска Ortonica Control One», «Кресло-коляска Ortonica Active Life »).


6. Описание и функциональные характеристики медицинского изделия

Кресло-коляска изготавливается в различных вариантах исполнения, отличающихся шириной сиденья, массой, габаритными размерами, конструктивными особенностями, дизайном, набором функциональных элементов и возможностью их регулировки.

Принцип действия Кресла-коляски состоит в приложении мускульной силы рук пациента к ободу ручного привода на задние колеса или мускульной силы сопровождающего лица к рукоятке Кресла-коляски, приводящей в движение Кресло-коляску с расположенным в ней пациентом.

6.1 Кресло-коляска Ortonica Base предназначена для пользования в положении сидя, имеет базовую комплектацию и базовый набор функций, управляется пациентом или сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складывается для удобства транспортировки, варианты исполнения отличаются комплектацией, конструктивными особенностями, функциональными элементами и возможностью их регулировки. Каждый вариант исполнения Кресла-коляски Ortonica Base имеет следующие ширины сиденья: 380 мм; 405 мм; 430 мм; 455 мм; 480 мм; 505 мм; 530 мм; 560 мм.

Кресло-коляска Ortonica Base представлена на Рис. 1 на примере варианта исполнения Base 700.

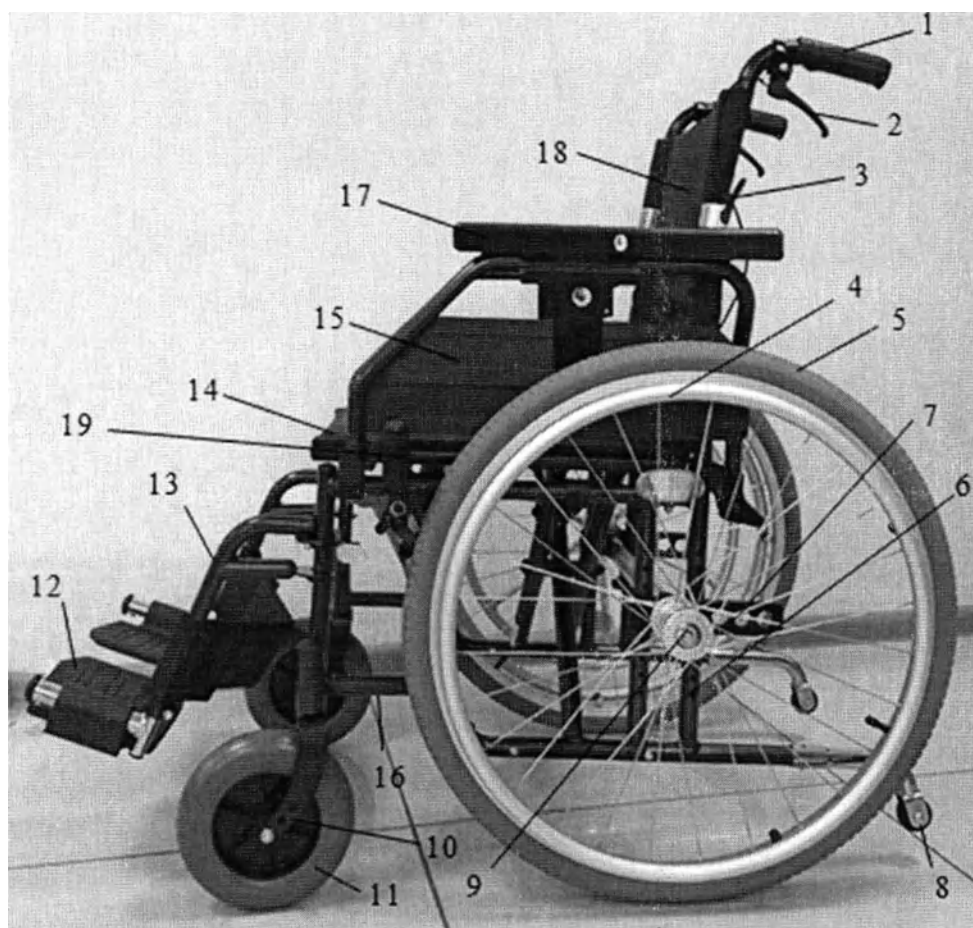

- | | |
|---|---|
| 1. Ручка для сопровождающего лица. | 11. Переднее колесо, самоориентирующееся. |
| 2. Рукоятка тормоза для сопровождающего лица. | 12. Опора для стоп. |
| 3. Фиксатор для складывания спинки | 13. Подножка тип 02. |
| 4. Приводной обод заднего колеса. | 14. Сиденье. |
| 5. Заднее колесо пневматическое тип 01 | 15. Боковой щиток |
| 6. Отверстия для регулировки заднего колеса по вертикали. | 16. Рама Кресла-коляски. |
| 7. Отверстия для регулировки заднего колеса по горизонтали. | 17. Подлокотники. |
| 8. Антипрокидыватель тип 06. | 18. Спинка. |
| 9. Быстросъемная ось заднего колеса. | 19. Рычаг стояночного тормоза |
| 10. Отверстия для регулировки самоориентирующегося колеса. | |

Рис. 1 Кресло-коляска Base 700

6.1.1 Основные технические характеристики Кресло-коляски Ortonica Base представлены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Вариант исполнения										
	Base 200	Base 250	Base 300	Base 350	Base 400	Base 450	Base 500	Base 550	Base 600	Base 650	Base 700
Ширина коляски, ±10 мм	575; 600; 625; 650; 675; 700; 725; 755	525; 550; 575; 600; 625; 650; 675; 705	525; 550; 575; 600; 625; 650; 675; 705	575; 600; 625; 650; 675; 700; 730; 750	535; 580; 605; 630; 655; 680; 710; 730	535; 580; 605; 630; 655; 680; 710; 730	545; 570; 595; 620; 645; 670; 695; 725	545; 570; 595; 620; 645; 670; 695; 725	545; 570; 595; 620; 645; 670; 695; 725	545; 570; 595; 620; 645; 670; 695; 725	545; 570; 595; 620; 645; 670; 695; 725
Ширина сиденья, ±10 мм	380; 405; 430; 455; 480; 505; 530; 560										
Угол наклона сиденья, ±1°	4										
Минимальная высота коляски, мм	840	910	910	920	930	930	920	920	920	920	920
Длина коляски, ±10 мм	1060	1020	1020	1130	1060	1130	1030	1030	1030	1030	1030
Ширина коляски в сложенном виде, ±10 мм	290	280	280	300	320	340	300	300	300	300	300
Минимальная высота коляски в сложенном виде, мм	840	910	910	920	750	750	720	500	500	500	500
Длина коляски в сложенном виде, ±10 мм	750	800	800	800	770	870	770	770	770	770	770
Глубина сиденья, ±10 мм	390	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Высота сиденья, ±10 мм	460	470	470	470	500	450	480	480	480	480	480
Угол наклона спинки, ±1 градус	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Высота подлокотника, ±10 мм	225	230	230	230	230	230-260	225-255	225-255	225-255	225-255	225-295
Шаг регулировки, мм	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	плавная
Кол-во шагов	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	
Кол-во положений	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	
Расстояние от подлокотника до спинки, ± 10 мм	300	300	300	300	300	300, 400	310	310	310	310	310, 340, 390, 430
Шаг регулировки, мм	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	30; 40
Кол-во шагов	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
Кол-во положений	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4
Длина подножки, ±1 мм	380-480	440-540	380-480	460-520	380-480	380-480	440-540	440-540	440-540	440-540	440-540
Шаг регулировки, мм	20	плавная	20	20	20	20	плавная	плавная	плавная	плавная	плавная
Кол-во шагов	5		5	3	5	5					
Кол-во положений	6		6	4	6	6					
Диапазон регулирования угла наклона подножки, ±1 градус	-	-	-	130-180	-	-	-	-	-	-	-
Шаг регулировки, градус	-	-	-	плавная	-	-	-	-	-	-	-

Кол-во шагов	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Кол-во положений	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Диаметр обода ручного привода, ± 10 мм	520	500	500	520	520	520	520	520	520	520	520
Масса, кг, не более	17	16	16	20	19	21	20	20	20	20	20
Масса самой тяжелой части, кг, не более	10	9	9	13	12	14	13	13	13	13	13
Максимальная допускаемая нагрузка, кг	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Высота препятствия, мм, не более	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Статическая устойчивость при спуске, ± 1 градус	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Статическая устойчивость при подъеме, ± 1 градус	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Статическая устойчивость боковая, ± 1 градус	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Минимальный радиус поворота, ± 70 мм	1060	1010	1010	1050	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030

6.1.2 Конструкция и функциональные характеристики Кресло-коляски Ortonica Base представлены в таблице 2.

Таблица 2

Вариант исполнения	Base 200	Base 250	Base 300	Base 350	Base 400	Base 450	Base 500	Base 550	Base 600	Base 650	Base 700
Рама											
Исполнение крестообразной конструкции	2 трубная	2 трубная	2 трубная	2 трубная	2 трубная	2 трубная	2 трубная	2 трубная	2 трубная	2 трубная	2 трубная
Подголовник											
Наличие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спинка											
Съемная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Регулируемая по высоте	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Регулируемая по углу наклона	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Складная	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+
					(фиксатор)	(фиксатор)		(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)
Подушка для спинки	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Ремни натяжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Распорка для	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

придания жесткости											
Оперативная регулировка угла наклона спинки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Боковые под-держки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ручки для сопровождающего лица											
Регулируемые по высоте	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система торможения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Фиксаторы регулировок спинки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Распорка для придания жесткости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подлокотники											
Откидные	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+
Съемные	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
		б/с	б/с	б/с	б/с	б/с					
Регулируемые по высоте	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
						(шестигран-ник)	(шестигран-ник)	(шестигран-ник)	(шестигран-ник)	(шестигран-ник)	(кнопочный фиксатор)
Регулируемые по глубине	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+
						(шестигран-ник)					(кнопочный фиксатор)
Боковые щитки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Сиденье											
Регулируемое по глубине	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремни натяжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подушка для сиденья	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Ремни безопасности	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Подножки											
Откидные	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Съемные	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с
Регулируемые по длине	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(шестигран-ник)	(шестигран-ник)	(шестигран-ник)	(шестигран-ник)	(шестигран-ник)

Регулируемые по углу наклона	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Упоры для голени	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Упор для коленей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремень для голени	*+	*+	*+	-	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Ремень для фиксации стоп	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Опоры для стоп откидные	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Опоры для стоп регулируемые по углу наклона	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Передние колеса											
Тип	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические
Регулируемые по вертикали	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Амортизаторы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Быстросъемные	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
					(фиксатор)	(фиксатор)					
Передняя вилка регулируемая по углу наклона	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задние колеса											
Тип	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические
Регулируемые по вертикали	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Регулируемые по горизонтали	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Амортизаторы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Быстросъемные	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Антипрокидыватель											
Наличие	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+
Быстросъемный	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+
Регулируемый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* при необходимости

б/с - быстросъемные

6.2 Кресло-коляска Ortonica Base Lite предназначена для пользования в положении сидя, имеет облегченную раму, изготовленную из алюминия, управляется пациентом или сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складывается для удобства транспортировки, варианты исполнения отличаются комплектацией, конструктивными особенностями, функциональными элементами и возможностью их регулировки. Каждый вариант исполнения Кресло-коляски Ortonica Base Lite имеет следующие ширины сиденья: 380 мм; 405 мм; 430 мм; 455 мм; 480 мм; 505 мм; 530 мм; 560 мм.

Кресло-коляска Ortonica Base Lite представлена на Рис. 2 на примере варианта исполнения Base Lite 450.



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Ручки для сопровождающего лица. | 11. Опоры для стоп. |
| 2. Рукоятка тормоза для сопровождающего лица. | 12. Ремень для фиксации стоп |
| 3. Приводной обод заднего колеса. | 13. Подножка тип 06. |
| 4. Заднее колесо цельнолитое. | 14. Подушка для сиденья тип 01. |
| 5. Отверстия для регулировки заднего колеса по вертикали. | 15. Боковой щиток. |
| 6. Отверстия для регулировки заднего колеса по горизонтали. | 16. Подлокотник. |
| 7. Антипрокидыватель 04. | 17. Ремни безопасности. |
| 8. Рама Кресла-коляски. | 18. Спинка. |
| 9. Отверстия для регулировки самоориентирующегося колеса. | 19. Рычаг стояночного тормоза |
| 10. Переднее колесо, самоориентирующееся. | |

Рис. 2 Кресло-коляска Base Lite 450

6.2.1 Основные технические характеристики Кресло-коляски Ortonica Base Lite представлены в таблице 3.

Таблица 3

Параметр	Вариант исполнения													
	Base Lite 100	Base Lite 150	Base Lite 200	Base Lite 250	Base Lite 300	Base Lite 350	Base Lite 400	Base Lite 450	Base Lite 500	Base Lite 550	Base Lite 600	Base Lite 650	Base Lite 700	
Ширина коляски, ±10 мм	545; 570; 595; 620; 645; 670; 695; 725	545; 570; 595; 620; 645; 670; 695; 725	570; 600; 625; 650; 675; 700; 725; 750;	560; 585; 610; 635; 660; 685; 710; 735;	545; 570; 595; 620; 645; 670; 695; 725	550; 575; 600; 625; 650; 675; 700; 725; 750; 780	600; 625; 650; 675; 700; 725; 750; 780	585; 610; 635; 660; 685; 710; 735; 765	655; 680; 705; 730; 755; 780; 805; 835	655; 680; 705; 730; 755; 780; 805; 835	655; 680; 705; 730; 755; 780; 805; 835	655; 680; 705; 730; 755; 780; 805; 835	655; 680; 705; 730; 755; 780; 805; 835	
Ширина сиденья, ±10 мм	380; 405; 430; 455; 480; 505; 530; 560													
Угол наклона сиденья, ±1°	4													
Минимальная высота коляски, мм	900	900	900	900	970	840	840	900	960	960	960	960	960	
Длина коляски, ±10 мм	980	980	1000	1030	1020	1140	1140	1130	1170	1170	1170	1170	1250	
Ширина коляски в сложенном виде, ±10 мм	270	270	300	300	340	310	310	340	330	330	330	330	330	
Минимальная высота коляски в сложенном виде, мм	900	670	900	900	750	780	780	830	880	880	880	880	880	
Длина коляски в сложенном виде, ±10 мм	740	740	800	800	800	810	810	820	820	820	820	820	820	
Глубина сиденья, ±10 мм	400	400	400	400	410-470	415-540	415-540	410-510	435-560	435-560	435-560	435-560	435-560	
Шаг регулировки, мм	-	-	-	-	20	25	25	25	25	25	25	25	25	
Кол-во шагов	-	-	-	-	3	5	5	4	5	5	5	5	5	
Кол-во положений	-	-	-	-	4	6	6	5	6	6	6	6	6	
Высота сиденья, ±10 мм	450	450	470	470	480	430	430	430	450	450	450	450	450	
Высота спинки, ±10 мм	400	400	410	470	480-580	410-510	410-510	430-530	430	430	430	430	430	
Шаг регулировки, мм	-	-	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	
Кол-во шагов	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	
Кол-во положений	-	-	-	-	5	5	5	5	-	-	-	-	-	
Угол наклона спинки, ±1 градус	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90-130	90-130	90-130	
Шаг регулировки, градус	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	
Кол-во шагов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	
Кол-во положений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	
Высота подлокотника, ±1 мм	230	230	250	250-320	230, 260	225, 265	225, 265	230, 260	200-270	200-270	200-270	200-270	200-270	
Шаг регулировки, мм	-	-	-	плавная	15	20	20	15	плавная	плавная	плавная	плавная	плавная	
Кол-во шагов	-	-	-		2	2	2	2						
Кол-во положений	-	-	-		3	3	3	3						
Расстояние от подлокотника до спинки, ± 10 мм	300	300	300	300	300, 400	290, 340, 400	290, 340, 400	300, 400	310, 340, 390, 430	310, 340, 390, 430	310, 340, 390, 430	310, 340, 390, 430	310, 340, 390, 430	
Шаг регулировки, мм	-	-	-	-	100	50; 60	50; 60	100	30; 50; 40	30; 50; 40	30; 50; 40	30; 50; 40	30; 50; 40	
Кол-во шагов	-	-	-	-	1	2	2	1	3	3	3	3	3	
Кол-во положений	-	-	-	-	2	3	3	2	4	4	4	4	4	

Длина подножки, ±1 мм	400-475	400-475	390-465	390-465	420-540	350-450	-	350-450	350-450	350-450	320-430	320-430	320-420
Шаг регулировки, мм	25	25	25	25	20	плавная	-	плавная	плавная	плавная	22	22	20
Кол-во шагов	3	3	3	3	6		-				5	5	5
Кол-во положений	4	4	4	4	7		-				6	6	6
Диапазон регулирования угла наклона подножки, ±1 градус	-	-	-	-	-	-	110 - 185	-	-	-	120 - 180	120 - 180	120 - 180
Шаг регулировки, градус	-	-	-	-	-	плавная	-	-	-	-	плавная	плавная	плавная
Кол-во шагов	-	-	-	-	-		-	-	-	-			
Кол-во положений	-	-	-	-	-		-	-	-	-			
Диаметр обода ручного привода, ±10 мм	480	480	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Масса, кг, не более	13	13	14	16	17	17	17	17	18	18	18	18	18
Масса самой тяжелой части, кг, не более	10	10	11	9	10	10	10	10	11	11	11	11	11
Максимальная допустимая нагрузка, кг	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Высота препятствия, мм, не более	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Статическая устойчивость при спуске, ±1 градус	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Статическая устойчивость при подъеме, ±1 градус	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Статическая устойчивость боковая, ±1 градус	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Минимальный радиус поворота, ±70 мм	1030	1030	1050	1040	1030	1030	1080	1070	1140	1140	1140	1140	1140

6.2.2 Конструкция и функциональные характеристики Кресло-коляски Ortonica Base Lite представлены в таблице 4.

Таблица 4

Вариант исполнения	Base Lite 100	Base Lite 150	Base Lite 200	Base Lite 250	Base Lite 300	Base Lite 350	Base Lite 400	Base Lite 450	Base Lite 500	Base Lite 550	Base Lite 600	Base Lite 650	Base Lite 700
Рама													
Исполнение крестообразной конструкции	4 трубная	4 трубная	2 трубная	2 трубная	3 трубная	3 трубная	3 трубная	3 трубная	2 трубная	2 трубная	3 трубная	3 трубная	3 трубная
Подголовник													
Наличие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спинка													
Съемная	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Регулируемая по высоте	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-
					(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)					

Регулируемая по углу наклона	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
Складная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подушка для спинки	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Ремни натяжения	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+
Распорка для придания жесткости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
Оперативная регулировка угла наклона спинки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Боковые поддержки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ручки для сопровождающего лица													
Съемные	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Регулируемые по высоте	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
					(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)
Система торможения	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+
Фиксаторы регулировок спинки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Распорка для придания жесткости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подлокотники													
Откидные	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Быстросъемные	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Регулируемые по высоте	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
				(кнопочный фиксатор)	(шестигранный фиксатор)	(шестигранный фиксатор)	(шестигранный фиксатор)	(шестигранный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)
Регулируемые по глубине	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
					(шестигранный фиксатор)	(шестигранный фиксатор)	(шестигранный фиксатор)	(шестигранный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)
Боковые щитки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Сиденье													
Регулируемое по глубине	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ремни натяжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подушка для	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+

сиденья													
Ремни безопасности	*+	*+	*+	*+	*+	+	+	+	+	+	+	+	+
Подножки													
Откидные	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Съемные	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	(шестигранник)	(шестигранник)	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с
Регулируемые по длине	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
	(шестигранник)	(шестигранник)	(гаечный ключ)	(гаечный ключ)	(шестигранник)	(шестигранник)		(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)
Регулируемые по углу наклона	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+
Упоры для голени	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+
Упор для коленей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремень для голени	*+	*+	*+	*+	*+	*+	-	*+	*+	*+	-	-	-
Ремень для фиксации стопы	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Опоры для стоп откидные	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Опоры для стоп регулируемые по углу наклона	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+
					(шестигранник)	(шестигранник)		(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)
Передние колеса													
Тип	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические
Регулируемые по вертикали	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Амортизаторы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Быстросъемные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Передняя вилка регулируемая по углу наклона	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+
Задние колеса													
Тип	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические
Регулируемые по вертикали	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Регулируемые по горизонтали	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+


Амортизаторы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Быстросъемные	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Антипрокидыватель													
Наличие	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Быстросъемный	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Регулируемый	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
			(кнопоч- ный фик- сатор)	(кнопоч- ный фик- сатор)		(кнопоч- ный фик- сатор)	(кнопоч- ный фик- сатор)	(кнопоч- ный фик- сатор)	(кнопоч- ный фик- сатор)	(кнопоч- ный фик- сатор)	(кнопоч- ный фик- сатор)	(кнопоч- ный фик- сатор)	(кнопоч- ный фик- сатор)

* при необходимости

б/с - быстросъемные

6.3 Кресло-коляска Ortonica Desk предназначена для пользования в положении сидя, имеет эргономичную конструкцию рамы и подножек, управляется пациентом или сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складывается для удобства транспортировки, варианты исполнения отличаются комплектацией, конструктивными особенностями, функциональными элементами и возможностью их регулировки. Каждый вариант исполнения Кресло-коляски Ortonica Desk имеет следующие ширины сиденья: 380 мм; 405 мм; 430 мм; 455 мм; 480 мм; 505 мм; 530 мм; 560 мм. Кресло-коляска Ortonica Desk снабжена ручным стояночным тормозом и ремнями безопасности.

Кресло-коляска Ortonica Desk представлена на Рис. 3 на примере варианта исполнения Desk 6000.

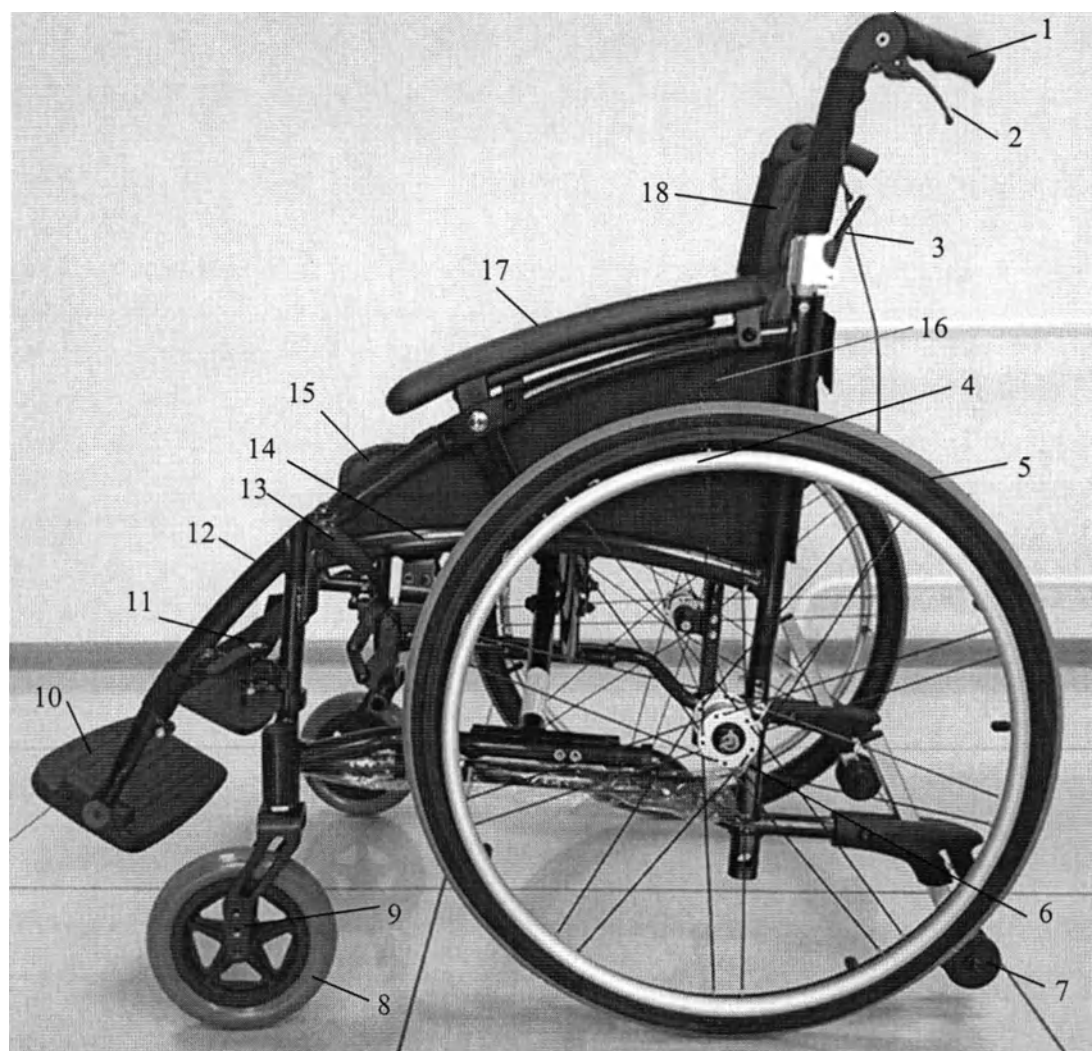

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Ручка для сопровождающего лица. | 10. Опора для стоп. |
| 2. Рукоятка тормоза для сопровождающего лица. | 11. Ремень для голени |
| 3. Фиксатор для складывания спинки. | 12. Подножка тип 7а. |
| 4. Приводной обод заднего колеса. | 13. Рычаг стояночного тормоза |
| 5. Заднее колесо пневматическое. | 14. Рама Кресла-коляски. |
| 6. Отверстия для регулировки заднего колеса по вертикали. | 15. Подушка для сиденья тип 01. |
| 7. Антипрокидыватель. | 16. Боковая панель. |
| 8. Переднее колесо, самоориентирующееся. | 17. Подлокотник. |
| 9. Отверстия для регулировки самоориентирующегося колеса. | 18. Спинка. |

Рис. 3 Кресло-коляска Desk 6000

6.3.1 Основные технические характеристики Кресло-коляски Ortonica Desk представлены в таблице 5.

Таблица 5

Параметр	Вариант исполнения							
	Desk 1000	Desk 2000	Desk 3000	Desk 4000	Desk 5000	Desk 6000	Desk 7000	Desk 8000
Ширина коляски, ±10 мм	570; 595; 620; 645; 670; 690; 720; 750							
Ширина сиденья, ±10 мм	380; 405; 430; 455; 480; 505; 530; 560							
Угол наклона сиденья, ±1°	4							
Минимальная высота коляски, мм	900	900	900	900	900	900	900	900
Длина коляски, ±10 мм	980	980	980	980	980	980	980	980
Ширина коляски в сложенном виде, ±10 мм	310	310	310	310	310	310	310	310
Минимальная высота коляски в сложенном виде, мм	730	730	730	730	730	730	730	730
Длина коляски в сложенном виде, ±10 мм	750	750	750	750	750	750	750	750
Глубина сиденья, ±10 мм	455	455	455	455	455	455	455	455
Высота сиденья, ±10 мм	450	450	450	450	450	450	450	450
Высота спинки, ±10 мм	420	420	420	420	420	420	420	420
Угол наклона спинки, ±1 градус	93	93	93	93	93	93	93	93
Высота подлокотника, ±1 мм	130-250	130-250	130-250	130-250	130-250	130-250	130-250	130-250
Шаг регулировки, мм	плавная	плавная	плавная	плавная	плавная	плавная	плавная	плавная
Кол-во шагов								
Кол-во положений								
Расстояние от подлокотника до спинки, ± 10 мм	360	360	360	360	360	360	360	360
Длина подножки, ±1 мм	310-410	310-410	310-410	310-410	310-410	310-410	310-410	310-410
Шаг регулировки, мм	плавная	плавная	плавная	плавная	плавная	плавная	20	20
Кол-во шагов							5	5
Кол-во положений							6	6
Масса, кг, не более	13	13	13	14	14	14	15	15
Масса самой тяжелой части, кг, не более	8	8	8	9	9	9	10	10
Максимальная допускаемая нагрузка, кг	130	130	130	130	130	130	130	130
Высота препятствия, мм, не более	40	40	40	40	40	40	40	40
Статическая устойчивость при спуске, ±1 градус	10	10	10	10	10	10	10	10
Статическая устойчивость при подъеме, ±1 градус	10	10	10	10	10	10	10	10
Статическая устойчивость бо-	10	10	10	10	10	10	10	10

ковая, ± 1 градус								
Минимальный радиус поворота, ± 70 мм	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050

6.3.2 Конструкция и функциональные характеристики Кресло-коляски Ortonica Desk представлены в таблице 6.

Таблица 6

Вариант исполнения	Desk 1000	Desk 2000	Desk 3000	Desk 4000	Desk 5000	Desk 6000	Desk 7000	Desk 8000
Рама								
Исполнение крестообразной конструкции	2 трубная	2 трубная	2 трубная	2 трубная	2 трубная	2 трубная	2 трубная	3 трубная
Подголовник								
Наличие	-	-	-	-	-	-	-	-
Спинка								
Съемная	-	-	-	-	-	-	-	-
Регулируемая по высоте	-	-	-	-	-	-	-	-
Регулируемая по углу наклона	-	-	-	-	-	-	-	-
Складная	-	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)
Подушка для спинки	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Ремни натяжения	-	-	-	-	-	-	-	-
Распорка для придания жесткости	-	-	-	-	-	-	-	-
Оперативная регулировка угла наклона спинки	-	-	-	-	-	-	-	-
Боковые поддержки	-	-	-	-	-	-	-	-
Ручки для сопровождающего лица								
Регулируемые по высоте	-	-	-	-	-	-	-	-
Система торможения	-	-	-	-	+	+	+	+
Фиксаторы регулировок спинки	-	-	-	-	-	-	-	-
Распорка для придания жесткости	-	-	-	-	-	-	-	-
Подлокотники								
Откидные	-	-	-	-	-	-	-	-


Съемные	-	-	-	-	-	-	-	-
Регулируемые по высоте	+	+	+	+	+	+	+	+
	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)
Регулируемые по глубине	-	-	-	-	-	-	-	-
Боковые щитки	+	+	+	+	+	+	+	+
Сиденье								
Регулируемое по глубине	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремни натяжения	-	-	-	-	-	-	-	-
Подушка для сиденья	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Ремни безопасности	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Подножки								
Откидные	+	+	+	+	+	+	+	+
Съемные	+	+	+	+	+	+	+	+
	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с
Регулируемые по высоте	+	+	+	+	+	+	+	+
	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)
Регулируемые по углу наклона	-	-	-	-	-	-	-	-
Упоры для голени	-	-	-	-	-	-	-	-
Упор для коленей	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремень для голени	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Ремень для фиксации стопы	-	-	-	-	-	-	-	-
Опоры для стоп откидные	+	+	+	+	+	+	+	+
Опоры для стоп с возможностью соединения в единую опору	-	-	-	-	-	-	-	-
Опоры для стоп регулируемые по углу наклона	-	-	-	-	-	+	+	+
						(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)
Передние колеса								
Тип	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические
Регулируемые по вертикали	-	-	-	+	+	+	+	+
Амортизаторы	-	-	-	-	-	-	-	-
Быстросъемные	-	-	-	-	-	-	+	+

Передняя вилка регулируемая по углу наклона	-	-	-	-	-	+	+	+
	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)					
Задние колеса								
Тип	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические
Регулируемые по вертикали	-	-	-	+	+	+	+	+
Регулируемые по горизонтали	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизаторы	-	-	-	-	-	-	-	-
Быстросъемные	+	+	+	+	+	+	+	+
Антипрокидыватель								
Наличие	-	+	+	+	+	+	+	+
Быстросъемные	-	+	+	+	+	+	+	+
Регулируемый	-	-	+	+	+	+	+	+
			(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)

* при необходимости
б/с - быстросъемные

6.4 Кресло-коляска Ortonica Recline предназначена для пользования в положении сидя и полулежа, имеет откидную спинку, регулируемую по углу наклона и по высоте, управляется пациентом или сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складывается для удобства транспортировки, варианты исполнения отличаются комплектацией, конструкцией, функциональными элементами и возможностью их регулировки. Каждый вариант исполнения Кресла-коляски Ortonica Recline имеет следующие ширины сиденья: 380 мм; 405 мм; 430 мм; 455 мм; 480 мм; 505 мм; 530 мм; 560 мм.

Кресло-коляска Ortonica Recline представлена на Рис. 4 на примере варианта исполнения Recline 500

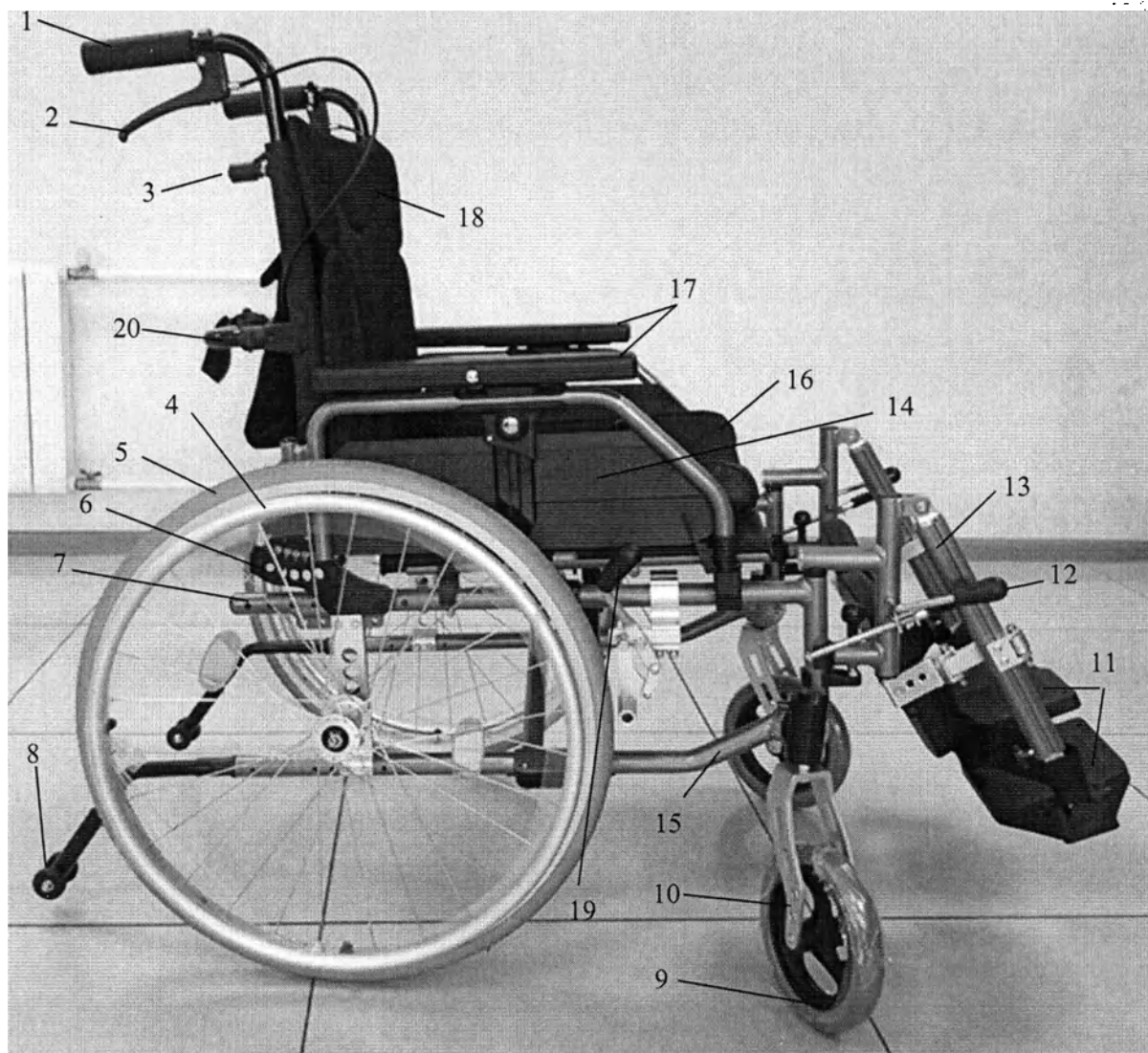

1. Ручка для сопровождающего лица.
2. Рукоятка тормоза для сопровождающего лица.
3. Фиксатор высоты ручек для сопровождающего лица.
4. Приводной обод заднего колеса.
5. Заднее колесо пневматическое.
6. Отверстия для регулировки наклона спинки
7. Отверстия для регулировки заднего колеса по горизонтали.
8. Антипрокидыватель тип 04.
9. Переднее колесо, самоориентирующееся.
10. Отверстия для регулировки самоориентирующегося колеса.

11. Опоры для стоп.
12. Рычаг регулировки подножки по углу наклона
13. Подножка, регулируемая по углу наклона тип 05.
14. Боковой шиток.
15. Рама Кресла-коляски.
16. Подушка для сиденья тип 01.
17. Подлокотники.
18. Подушка для спинки тип 02
19. Рычаг стояночного тормоза
20. Распорка для придания жесткости

Рис. 4 Кресло-коляска Recline 500

6.4.1 Основные технические характеристики Кресло-коляски Ortonica Recline представлены в таблице 7.

Таблица 7

Параметр	Вариант исполнения							
	Recline 100	Recline 200	Recline 300	Recline 400	Recline 500	Recline 600	Recline 700	Recline 800
Ширина коляски, ±10 мм	590; 610; 635; 660; 685; 710; 730; 750	600; 625; 650; 675; 700; 725; 750; 780	600; 625; 650; 675; 700; 725; 750; 780	600; 625; 650; 675; 700; 725; 750; 780	600; 625; 650; 675; 700; 725; 750; 780	600; 625; 650; 675; 700; 725; 750; 780	600; 625; 650; 675; 700; 725; 750; 780	600; 625; 650; 675; 700; 725; 750; 780
Ширина сиденья, ±10 мм	380; 405; 430; 455; 480; 505; 530; 560							
Угол наклона сиденья, ±1°	4							
Минимальная высота коляски, мм	970	890	890	985	920	920	920	920
Длина коляски, ±10 мм	1200	1170	1170	1160	1120	1120	1170	1170
Ширина коляски в сложенном виде, ±10 мм	300	320	320	310	320	320	320	320
Минимальная высота коляски в сложенном виде, мм	970	890	890	700	840	840	840	840
Длина коляски в сложенном виде, ±10 мм	900	850	850	830	860	860	860	860
Глубина сиденья, ±10 мм	440	400-500	400-500	400-525	410-535	410-535	410-535	410-535
<i>Шаг регулировки, мм</i>	-	25	25	25	25	25	25	25
<i>Кол-во шагов</i>	-	4	4	5	5	5	5	5
<i>Кол-во положений</i>	-	5	5	6	6	6	6	6
Высота сиденья, ±10 мм	480	450	450	430	470	470	470	470
Высота спинки, ±10 мм	500	420	420	510-610	420	420	420	420
<i>Шаг регулировки, мм</i>	-	-	-	25	-	-	-	-
<i>Кол-во шагов</i>	-	-	-	4	-	-	-	-
<i>Кол-во положений</i>	-	-	-	5	-	-	-	-
Угол наклона спинки, ±1 градус	100-170	90 - 130	90 - 130	90 - 130	90 - 130	90 - 130	90 - 130	90 - 130
<i>Шаг регулировки, градус</i>	плавная	10	10	10	10	10	10	10
<i>Кол-во шагов</i>		4	4	4	4	4	4	4
<i>Кол-во положений</i>		5	5	5	5	5	5	5
Высота подлокотника, ±1 мм	230-260	240-270	240-270	225-255	160-230	160-230	160-230	160-230
<i>Шаг регулировки, мм</i>	15	15	15	15	плавная	плавная	плавная	плавная
<i>Кол-во шагов</i>	2	2	2	2				
<i>Кол-во положений</i>	3	3	3	3				
Расстояние от подлокотника до спинки, ± 10 мм	320, 405	290, 345, 400	290, 345, 400	290, 345, 400	290, 320, 360, 400	290, 320, 360, 400	290, 320, 360, 400	290, 320, 360, 400
<i>Шаг регулировки, мм</i>	85	55	55	55	30; 40	30; 40	30; 40	30; 40
<i>Кол-во шагов</i>	1	2	2	2	3	3	3	3
<i>Кол-во положений</i>	3	3	3	3	4	4	4	4

Длина подножки, ± 1 мм	540-640	350-450	350-450	350-450	320-430	320-430	320-420	320-420
Шаг регулировки, мм	20	плавная	плавная	плавная	22	22	20	20
Кол-во шагов	5				5	5	5	5
Кол-во положений	6				6	6	6	6
Диапазон регулирования угла наклона подножки, ± 1 градус	130-200	-	-	-	120-180	120-180	120-180	120-180
Шаг регулировки, градус	плавная	-	-	-	плавная	плавная	плавная	плавная
Кол-во шагов		-	-	-				
Кол-во положений		-	-	-				
Диаметр обода ручного привода, ± 10 мм	520	520	520	520	520	520	520	520
Масса, кг, не более	25	17	17	19	17	17	17	17
Масса самой тяжелой части, кг, не более	18	10	10	12	10	10	10	10
Максимальная допускаемая нагрузка, кг	130	130	130	130	130	130	130	130
Высота препятствия, мм, не более	40	40	40	40	40	40	40	40
Статическая устойчивость при спуске, ± 1 градус	10	10	10	10	10	10	10	10
Статическая устойчивость при подъеме, ± 1 градус	10	10	10	10	10	10	10	10
Статическая устойчивость боковая, ± 1 градус	10	10	10	10	10	10	10	10
Минимальный радиус поворота, ± 70 мм	1050	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080

6.4.2 Конструкция и функциональные характеристики Кресло-коляски Ortonica Recline представлены в таблице 8.

Таблица 8

Вариант исполнения	Recline 100	Recline 200	Recline 300	Recline 400	Recline 500	Recline 600	Recline 700	Recline 800
Рама								
Исполнение крестообразной конструкции	2 трубная	3 трубная	3 трубная	3 трубная	3 трубная	3 трубная	3 трубная	4 трубная
Подголовник								
Наличие	+	-	-	+	-	-	+	+
Съемный	+	-	-	+	-	-	+	+
Регулируемый по высоте	+	-	-	+	-	-	+	+
	(лента Velcro)			(фиксатор)			(фиксатор)	(фиксатор)
Регулируемый по углу наклона	-	-	-	+	-	-	+	+
				(фиксатор)			(фиксатор)	(фиксатор)
Регулируемый по обхвату головы	-	-	-	+	-	-	+	+
Спинка								


Съемная	-	+	-	+	-	-	-	-
Регулируемая по высоте	-	-	-	+	-	-	-	-
Регулируемая по углу наклона	+	+	+	+	+	+	+	+
Складная	-	-	-	+	+	+	+	+
				(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)
Подушка для спинки	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Ремни натяжения	-	-	-	+	+	+	+	+
Распорка для придания жесткости	-	-	-	-	+	+	+	+
Оперативная регулировка угла наклона (ремень)	+	+	+	+	+	+	+	+
Боковые поддержки	-	-	-	-	-	-	-	-
Ручки для сопровождающего лица								
Регулируемые по высоте	-	-	-	+	+	+	+	+
				(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)
Система торможения	-	-	-	-	-	-	-	-
Фиксаторы регулировок спинки	+	-	-	-	+	+	+	+
Распорка для придания жесткости	+	+	+	+	-	-	-	-
Подлокотники								
Откидные	-	+	+	+	+	+	+	+
Съемные	+	+	+	+	+	+	+	+
	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с
Регулируемые по высоте	+	+	+	+	+	+	+	+
	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)
Регулируемые по глубине	+	+	+	+	+	+	+	+
	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)
Боковые щитки	+	+	+	+	+	+	+	+
Сиденье								
Регулируемое по глубине	-	+	+	+	+	+	+	+
Ремни натяжения	-	-	-	-	-	-	-	-
Подушка для сиденья	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Ремни безопасности	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Подножки								
Откидные	+	+	+	+	+	+	+	+
Съемные	+	+	+	+	+	+	+	+

Регулируемые по длине	б/с +	б/с +	б/с +	б/с +	б/с +	б/с +	б/с +	б/с +
	(кнопочный фиксатор)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)
Регулируемые по углу наклона	+	-	-	-	+	+	+	+
	(рычаг)				(рычаг)	(рычаг)	(рычаг)	(рычаг)
Упоры для голени	+	-	-	-	+	+	+	+
Упор для коленей	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремень для голени	*+	*+	*+	*+	-	-	-	-
Ремень для фиксации стопы	-	+	+	+	+	+	+	+
Опоры для стоп откидные	+	+	+	+	+	+	+	+
Опоры для стоп регулируемые по углу наклона	-	+	+	+	+	+	+	+
		(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)
Передние колеса								
Тип	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические
Регулируемые по вертикали	-	+	+	+	+	+	+	+
Амортизаторы	-	-	-	-	-	-	-	-
Быстроразъемные	-	-	-	-	+	+	+	+
Передняя вилка регулируемая по углу наклона	-	-	-	-	+	+	+	+
					(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)
Задние колеса								
Тип	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические
Регулируемые по вертикали	-	+	+	+	+	+	+	+
Регулируемые по горизонтали	-	+	+	+	+	+	+	+
Амортизаторы	-	-	-	-	-	-	-	-
Быстроразъемные	+	+	+	+	+	+	+	+
Антипрокидыватель								
Наличие	+	+	+	+	+	+	+	+
Быстроразъемный	+	+	+	+	+	+	+	+
Регулируемый	-	+	+	+	+	+	+	+
		(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)

* при необходимости
б/с - быстроразъемные

6.5 Кресло-коляска Ortonica Delux предназначена для пользования в положении сидя, имеет независимую подвеску, управляется пациентом или сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складывается для удобства транспортировки, варианты исполнения отличаются комплектацией, конструкцией, функциональными элементами и возможностью их регулировки. Каждый вариант исполнения Кресла-коляски Ortonica Delux имеет следующие ширины сиденья: 380 мм; 405 мм; 430 мм; 455 мм; 480 мм; 505 мм; 530 мм; 560 мм.

Кресло-коляска Ortonica Delux представлена на Рис. 5 на примере варианта исполнения Delux 900.

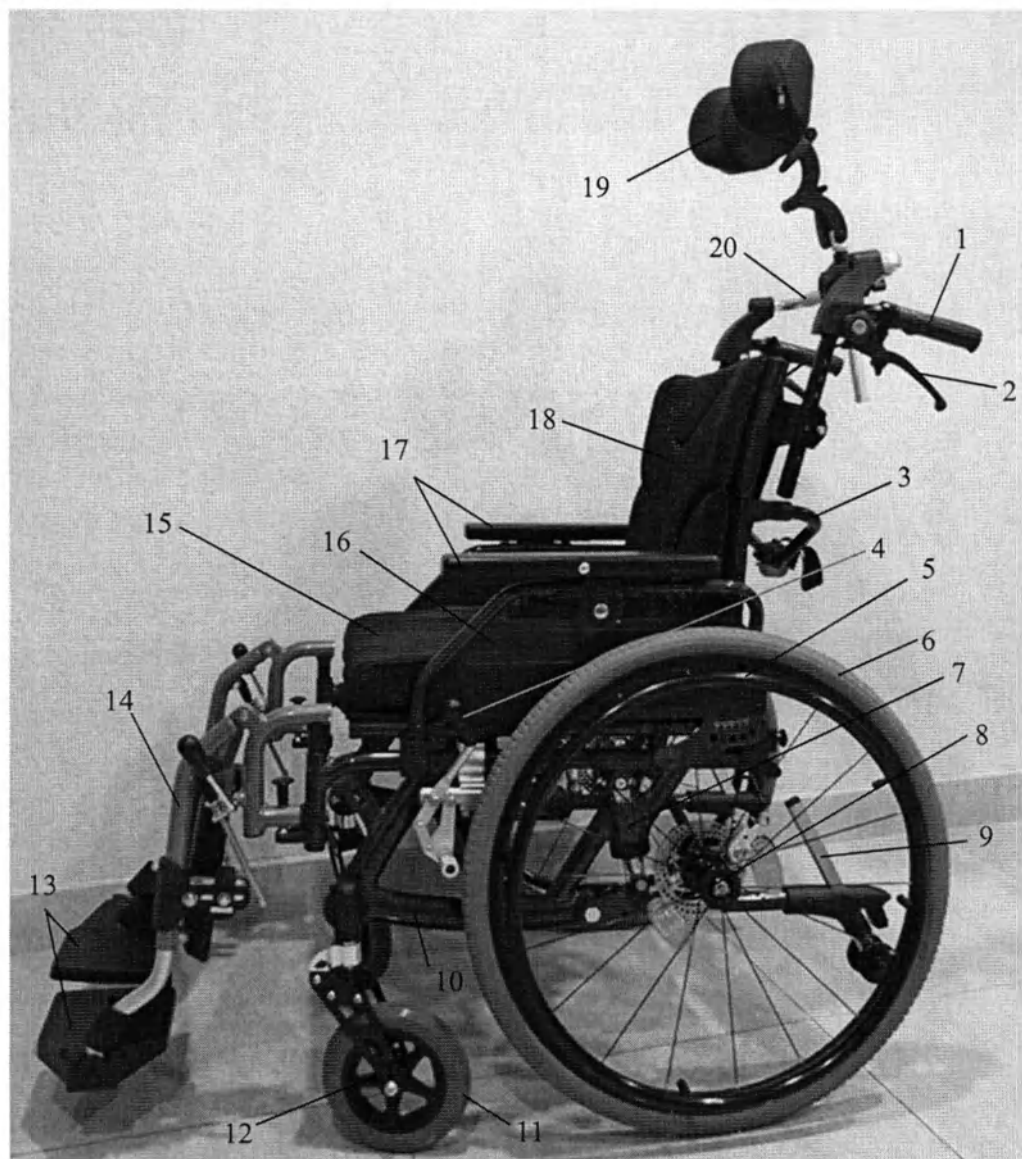

- | | |
|---|--|
| 1. Ручка для сопровождающего лица. | 11. Переднее колесо, самоориентирующееся. |
| 2. Рукоятка тормоза для сопровождающего лица. | 12. Отверстия для регулировки самоориентирующегося колеса. |
| 3. Распорка для придания жесткости | 13. Опоры для стоп. |
| 4. Рычаг стояночного тормоза | 14. Подножка, регулируемая по углу наклона тип 06. |
| 5. Приводной обод заднего колеса. | 15. Подушка для сиденья тип 02. |
| 6. Заднее колесо пневматическое. | 16. Боковой щиток. |
| 7. Независимая подвеска | 17. Подлокотники. |
| 8. Быстросъемная ось заднего колеса | 18. Подушка для спинки тип 01 |
| 9. Антипрокидыватель. | 19. Подголовник тип 03 |
| 10. Рама Кресла-коляски | 20. Держатель подголовника |

Рис. 5 Кресло-коляска Delux 900

6.5.1 Технические характеристики Кресло-коляски Ortonica Delux представлены в таблице 9.

Таблица 9

Параметр	Вариант исполнения						
	Delux 600	Delux 650	Delux 700	Delux 750	Delux 800	Delux 850	Delux 900
Ширина коляски, ±10 мм	555; 580; 605; 630; 655; 680; 705; 735	555; 580; 605; 630; 655; 680; 705; 735	555; 580; 605; 630; 655; 680; 705; 735	575; 600; 620; 650; 675; 700; 730; 750	575; 600; 620; 650; 675; 700; 730; 750	575; 600; 620; 650; 675; 700; 730; 750	575; 600; 620; 650; 675; 700; 730; 750
Ширина сиденья, ±10 мм	380; 405; 430; 455; 480; 505; 530; 560						
Угол наклона сиденья, ±1°	4						
Минимальная высота коляски, мм	970	970	970	900	900	900	900
Длина коляски, ±10 мм	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Ширина коляски в сложенном виде, ±10 мм	420	420	420	310	310	310	310
Минимальная высота коляски в сложенном виде, мм	770	770	770	750	750	750	750
Длина коляски в сложенном виде, ±10 мм	850	850	850	830	830	830	830
Глубина сиденья, ±10 мм	450	450	450	470	470	470	470
<i>Шаг регулировки, мм</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кол-во шагов</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кол-во положений</i>	-	-	-	-	-	-	-
Высота сиденья, ±10 мм	460	460	480	440	440	440	440
Высота спинки, ±10 мм	380	380	380	440-465	440-465	440-465	440-465
<i>Шаг регулировки, мм</i>	-	-	-	25	25	25	25
<i>Кол-во шагов</i>	-	-	-	1	1	1	1
<i>Кол-во положений</i>	-	-	-	2	2	2	2
Угол наклона спинки, ±1 градус	90	90	90	90	90	90 - 130	90 - 130
<i>Шаг регулировки, градус</i>	-	-	-	-	-	10	10
<i>Кол-во шагов</i>	-	-	-	-	-	4	4
<i>Кол-во положений</i>	-	-	-	-	-	5	5
Высота подлокотника, ±1 мм	230	160-230	160-230	200-270	200-270	200-270	200-270
<i>Шаг регулировки, мм</i>	-	10	10	10	10	10	10
<i>Кол-во шагов</i>	-	7	7	7	7	7	7
<i>Кол-во положений</i>	-	8	8	8	8	8	8
Расстояние от подлокотника до спинки, ± 10 мм	290	290	290	290, 320, 360, 400	290, 320, 360, 400	290, 320, 360, 400	290, 320, 360, 400
<i>Шаг регулировки, мм</i>	-	-	-	30; 40	30; 40	30; 40	30; 40
<i>Кол-во шагов</i>	-	-	-	3	3	3	3
<i>Кол-во положений</i>	-	-	-	4	4	4	4
Длина подножки, ±1 мм	370-520	370-520	370-520	420-540	420-540	420-540	540-640
<i>Шаг регулировки, мм</i>	плавная	плавная	плавная	20	20	20	плавная
<i>Кол-во шагов</i>				6	6	6	

Кол-во положений				7	7	7	
Диапазон регулирования угла наклона подножки, ± 1 градус	-	-	-	-	-	-	110-185
Шаг регулировки, градус	-	-	-	-	-	-	плавная
Кол-во шагов	-	-	-	-	-	-	
Кол-во положений	-	-	-	-	-	-	
Диаметр обода ручного привода, ± 10 мм	520	520	520	520	520	520	520
Масса, кг, не более	17	17	17	21	21	21	25
Масса самой тяжелой части, кг, не более	10	10	10	14	14	14	18
Максимальная допускаемая нагрузка, кг	130	130	130	130	130	130	130
Высота препятствия, мм, не более	40	40	40	40	40	40	40
Статическая устойчивость при спуске, ± 1 градус	10	10	10	10	10	10	10
Статическая устойчивость при подъеме, ± 1 градус	10	10	10	10	10	10	10
Статическая устойчивость боковая, ± 1 градус	10	10	10	10	10	10	10
Минимальный радиус поворота, ± 70 мм	1030	1030	1030	1050	1050	1050	1050

6.5.2 Конструкция и функциональные характеристики Кресло-коляски Ortonica Delux представлены в таблице 10.

Таблица 10

Вариант исполнения	Delux 600	Delux 650	Delux 700	Delux 750	Delux 800	Delux 850	Delux 900
Рама							
Исполнение крестообразной конструкции	2 трубная	2 трубная	2 трубная	2 трубная	3 трубная	2 трубная	2 трубная
Подголовник							
Наличие	-	-	-	-	-	-	*+
Съемный	-	-	-	-	-	-	+
Регулируемый по высоте	-	-	-	-	-	-	+
Регулируемый по углу наклона	-	-	-	-	-	-	+
Регулируемый по обхвату головы	-	-	-	-	-	-	+
Спинка							
Съемная	-	-	-	-	-	-	-

Регулируемая по высоте	-	-	-	-	-	-	-
Регулируемая по углу наклона	-	-	-	-	-	+	+
Складная	+	+	+	-	-	-	-
	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)				
Подушка для спинки	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Ремни натяжения	-	-	-	+	+	+	+
Распорка для придания жесткости	-	-	-	+	+	+	+
Оперативная регулировка угла наклона	-	-	-	-	-	-	-
Боковые поддержки	-	-	-	-	-	-	-
Ручки для сопровождающего лица							
Регулируемые по высоте	-	-	-	+	+	+	+
				(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)
Система торможения	-	-	-	+	+	+	+
Фиксаторы регулировок спинки	-	-	-	-	-	-	-
Распорка для придания жесткости	-	-	-	-	-	-	-
Подлокотники							
Откидные	+	+	+	+	+	+	+
Съемные	-	-	-	+	+	+	+
				б/с	б/с	б/с	б/с
Регулируемые по высоте	-	+	+	+	+	+	+
		(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)
Регулируемые по глубине	-	-	-	+	+	+	+
				(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)
Боковые щитки	+	+	+	+	+	+	+
Сиденье							
Регулируемое по глубине	-	-	-	-	-	-	-
Ремни натяжения	-	-	-	+	+	+	+
Подушка для сиденья	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Ремни безопасности	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Подножки							
Откидные	+	+	+	+	+	+	+
Съемные	+	+	+	+	+	+	+
	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с
Регулируемые по длине	+	+	+	+	+	+	+
	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)
Регулируемые по углу наклона	-	-	-	-	-	-	+
Упоры для голени	-	-	-	-	-	-	-


Упор для коленей	-	-	-	-	-	-	-
Ремень для голени	*+	*+	*+	*+	*+	*+	-
Ремень для фиксации стопы	-	-	-	+	+	+	+
Опоры для стоп откидные	+	+	+	+	+	+	+
Опоры для стоп регулируемые по углу наклона	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+	+	+	+
Возможность соединения в единую опору	-	-	-	+	+	+	-
Передние колеса							
Тип	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические
Регулируемые по вертикали	-	-	+	+	+	+	+
Амортизаторы	-	-	-	+	+	+	+
Быстросъемные	-	-	-	-	-	-	-
Передняя вилка регулируемая по углу наклона	-	-	-	-	-	-	-
Задние колеса							
Тип	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические
Регулируемые по вертикали	-	-	-	+	+	+	+
Регулируемые по горизонтали	-	-	-	+	+	+	+
Амортизаторы	+	+	+	+	+	+	+
Быстросъемные	+	+	+	+	+	+	+
Антипрокидыватель							
Наличие	-	+	+	+	+	+	+
Быстросъемный	-	+	+	+	+	+	+
Регулируемый	-	+(кнопочный фиксатор)	+(кнопочный фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)

* при необходимости

б/с - быстросъемные

6.6 Кресло-коляска Ortonica Home предназначена для пользования в положении сидя, имеет малые габариты, регулируемую по высоте ориентацию сиденья, откидные, быстросъемные и регулируемые по длине подножки, управляется пациентом или сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складывается для удобства транспортировки, варианты исполнения отличаются комплектацией, конструкцией, функциональными элементами и возможностью их регулировки. Каждый вариант исполнения Кресла-коляски Ortonica Home имеет следующие ширины сиденья: 305 мм; 330 мм; 355 мм; 380 мм; 405 мм; 430 мм; 455 мм; 480 мм.

Кресло-коляска Ortonica Home представлена на Рис. 6 на примере варианта исполнения Home 70.

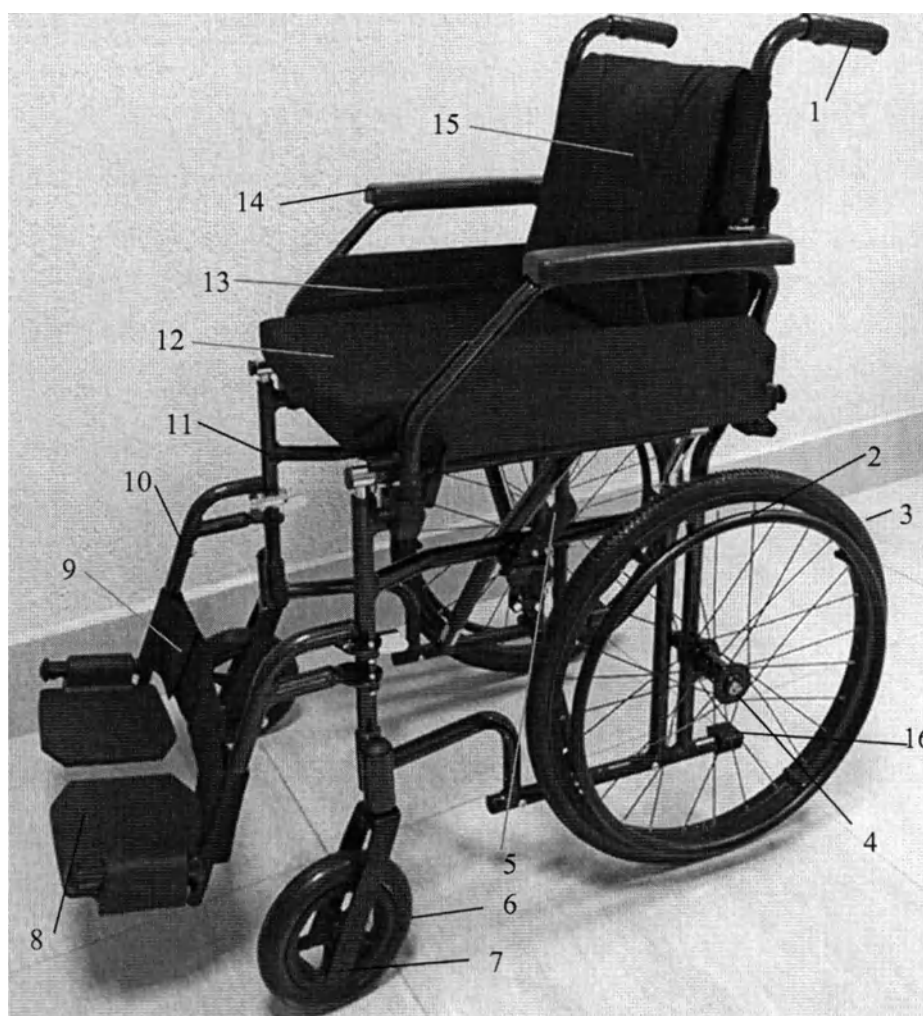

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Ручка для сопровождающего лица. | 9. Ремень для голени. |
| 2. Приводной обод заднего колеса. | 10. Подножка, тип 02. |
| 3. Заднее колесо цельнолитое. | 11. Рама Кресла-коляски |
| 4. Быстросъемная ось заднего колеса | 12. Подушка для сиденья, тип 01. |
| 5. Рычаг стояночного тормоза. | 13. Боковой щиток. |
| 6. Переднее колесо, самоориентирующееся. | 14. Подлокотник. |
| 7. Отверстия для регулировки самоориентирующегося колеса. | 15. Подушка для спинки, тип 02 |
| 8. Опора для стоп. | 16. Упор для сопровождающего лица |

Рис. 6 Кресло-коляска Home 70

6.6.1 Технические характеристики Кресло-коляски Ortonica Home представлены в таблице 11.

Таблица 11

Параметр	Вариант исполнения						
	Home 50	Home 60	Home 70	Home 80	Home 90	Home 100	Home 110
Ширина коляски, ±10 мм	435; 460; 490; 520; 535; 560; 585; 610	435; 460; 490; 520; 535; 560; 585; 610	400; 425; 450; 475; 500; 525; 550; 575	400; 425; 450; 475; 500; 525; 550; 575	400; 425; 450; 475; 500; 525; 550; 575	400; 425; 450; 475; 500; 525; 550; 575	400; 425; 450; 475; 500; 525; 550; 575
Ширина сиденья, ±10 мм	305; 330; 355; 380; 405; 430; 455; 480						
Угол наклона сиденья, ±1°	4						
Минимальная высота коляски, мм	940	940	1015	1015	1015	1015	1015
Длина коляски, ±10 мм	1000	1000	990	990	990	990	990
Ширина коляски в сложенном виде, ±10 мм	300	300	290	290	290	290	290
Минимальная высота коляски в сложенном виде, мм	940	770	800	800	800	800	800
Длина коляски в сложенном виде, ±10 мм	820	820	710	710	710	710	710
Глубина сиденья, ±10 мм	400	400	420	420	420	420	420
Высота сиденья, ±10 мм	480	480	525	525	525	525	525
Высота спинки, ±10 мм	400	400	390	390	390	390	390
Угол наклона спинки, ± 1 градус	90	90	90	90	90	85-105	85-105
<i>Шаг регулировки, градус</i>	-	-	-	-	-	5	5
<i>Кол-во шагов</i>	-	-	-	-	-	4	4
<i>Кол-во положений</i>	-	-	-	-	-	5	5
Высота подлокотника, ± 1 мм	210	210	210	210-240	210-240	210-240	210-240
<i>Шаг регулировки, мм</i>	-	-	-	15	15	15	15
<i>Кол-во шагов</i>	-	-	-	2	2	2	2
<i>Кол-во положений</i>	-	-	-	3	3	3	3
Расстояние от подлокотника до спинки, ± 10 мм	145	145	145	145, 205, 255	145, 205, 255	145, 205, 255	145, 205, 255
<i>Шаг регулировки, мм</i>	-	-	-	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
<i>Кол-во шагов</i>	-	-	-	2	2	2	2
<i>Кол-во положений</i>	-	-	-	3	3	3	3
Длина подножки, ± 1 мм	380-480	380-480	440-540	440-540	440-540	440-540	440-540
<i>Шаг регулировки, мм</i>	20	20	плавная	плавная	плавная	плавная	плавная
<i>Кол-во шагов</i>	5	5					
<i>Кол-во положений</i>	6	6					

Диаметр обода ручного привода, ± 10 мм	430	430	440	440	440	440	440
Масса, кг, не более	18	18	13	13	13	13	13
Масса самой тяжелой части, кг, не более	11	11	9	9	9	9	9
Максимальная допускаемая нагрузка, кг	130	130	130	130	130	130	130
Высота препятствия, мм, не более	40	40	40	40	40	40	40
Статическая устойчивость при спуске, ± 1 градус	10	10	10	10	10	10	10
Статическая устойчивость при подъеме, ± 1 градус	10	10	10	10	10	10	10
Статическая устойчивость боковая, ± 1 градус	10	10	10	10	10	10	10
Минимальный радиус поворота, ± 70 мм	910	910	880	880	880	880	880

6.6.2 Конструкция и функциональные характеристики Кресло-коляски Ortonica Home представлены в таблице 12.

Таблица 12

Вариант исполнения	Home 50	Home 60	Home 70	Home 80	Home 90	Home 100	Home 110
Рама							
Исполнение крестообразной конструкции	2 трубная	2 трубная	2 трубная	2 трубная	2 трубная	2 трубная	2 трубная
Подголовник							
Наличие	-	-	-	-	-	-	-
Спинка							
Съемная	-	-	-	-	-	-	-
Регулируемая по высоте	-	-	-	-	-	-	-
Регулируемая по углу наклона	-	-	-	-	-	+	+
Складная	-	+	+	+	+	+	+
		(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)
Подушка для спинки	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Ремни натяжения	-	-	-	-	-	-	-
Распорка для придания жесткости	-	-	-	-	-	-	-
Оперативная регулировка спинки	-	-	-	-	-	-	-
Боковые поддержки	-	-	-	-	-	-	-

Ручки для сопровождающего лица							
Регулируемые по высоте	-	-	-	-	-	-	-
Система торможения	-	-	-	-	-	-	+
Фиксаторы регулировок спинки	-	-	-	-	-	-	-
Распорка для придания жесткости	-	-	-	-	-	-	-
Подлокотники							
Откидные	-	-	+	+	+	+	+
Съемные	+	+	+	+	+	+	+
	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с
Регулируемые по высоте	-	-	-	+	+	+	+
				(шестигранник)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)
Регулируемые по глубине	-	-	-	+	+	+	+
				(шестигранник)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)
Боковые щитки	+	+	+	+	+	+	+
Сиденье							
Регулируемое по глубине	-	-	-	-	-	-	-
Ремни натяжения	-	-	-	-	-	-	-
Подушка для сиденья	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Ремни безопасности	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Подножки							
Откидные	+	+	+	+	+	+	+
Быстросъемные	+	+	+	+	+	+	+
Регулируемые по длине	+	+	+	+	+	+	+
	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)
Регулируемые по углу наклона	-	-	-	-	-	-	-
Упоры для голени	-	-	-	-	-	-	-
Упор для коленей	-	-	-	-	-	-	-
Ремень для голени	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Ремень для фиксации стопы	-	-	+	+	+	+	+
Опоры для стоп откидные	+	+	+	+	+	+	+
Опоры для стоп регулируемые по углу наклона	-	-	-	-	-	-	-
Передние колеса							
Тип	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические
Регулируемые по	+	+	+	+	+	+	+


вертикали							
Амортизаторы	-	-	-	-	-	-	-
Быстросъемные	-	-	-	-	-	-	-
Передняя вилка регулируемая по углу наклона	-	-	-	-	-	-	-
Задние колеса							
Тип	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические
Регулируемые по вертикали	-	-	-	-	+	+	+
Регулируемые по горизонтали	-	-	-	-	+	+	+
Амортизаторы	-	-	-	-	-	-	-
Быстросъемные	-	-	+	+	+	+	+
Антипрокидыватель							
Наличие	-	-	-	+	+	+	+
Быстросъемный	-	-	-	+	+	+	+
Регулируемый	-	-	-	+	+	+	+

* при необходимости

б/с - быстросъемные

6.7 Кресло-коляска Ortonica Puma предназначена для пользования в положении сидя как для взрослых так и для детей, управляется пациентом или сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складывается для удобства транспортировки, варианты исполнения отличаются комплектацией, конструкцией, функциональными элементами и возможностью их регулировки. Каждый вариант исполнения Кресла-коляски имеет следующие ширины сиденья: 305 мм; 330 мм; 355 мм; 380 мм; 405 мм; 430 мм; 455 мм; 480 мм; 505 мм; 530 мм; 560 мм.

Кресло-коляска Ortonica Puma представлена на Рис. 7 на примере варианта исполнения Puma 500.

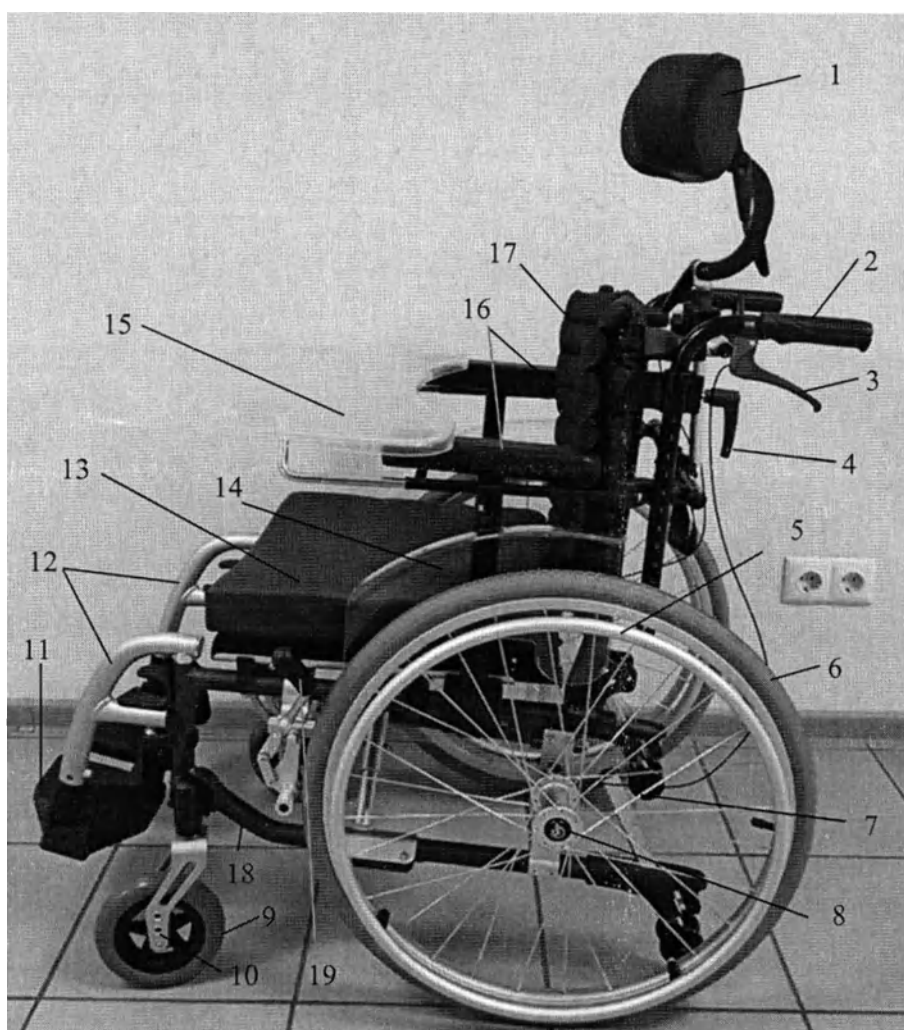

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Подголовник | 11. Опоры для стоп. |
| 2. Ручка для сопровождающего лица. | 12. Подножка тип 09. |
| 3. Рукоятка тормоза для сопровождающего лица. | 13. Подушка для сиденья тип 01. |
| 4. Фиксатор высоты ручки для сопровождающего лица. | 14. Боковой щиток. |
| 5. Приводной обод заднего колеса. | 15. Столешница. |
| 6. Заднее колесо пневматическое. | 16. Подлокотники. |
| 7. Антипрокидыватель. | 17. Подушка для спинки тип 01 |
| 8. Быстросъемная ось заднего колеса. | 18. Рама Кресла-коляски |
| 9. Переднее колесо, самоориентирующееся. | 19. Рычаг стояночного тормоза |
| 10. Отверстия для регулировки самоориентирующегося колеса. | |

Рис. 7 Кресло-коляска Puma 500

6.7.1 Технические характеристики Кресло-коляски Ortonica Puma представлены в таблице 13.

Таблица 13

Параметр	Вариант исполнения					
	Puma 100	Puma 200	Puma 300	Puma 400	Puma 500	Puma 600
Ширина коляски, ±10 мм	500; 525; 550; 575; 600; 625; 650; 675; 700; 725; 755					
Ширина сиденья, ±10 мм	305; 330; 355; 380; 405; 430; 455; 480; 505; 530; 560					
Угол наклона сиденья, ±1°	4					
Минимальная высота коляски, мм	1050	840	840	840	840	840
Длина коляски, ±10 мм	800	940	940	940	940	940
Ширина коляски в сложенном виде, ±10 мм	280	310	310	310	310	310
Минимальная высота коляски в сложенном виде, мм	800	820	820	820	820	820
Длина коляски в сложенном виде, ±10 мм	670	750	750	750	750	750
Глубина сиденья, ±10 мм	330	405-455	405-455	405-455	405-455	405-455
<i>Шаг регулировки, мм</i>	-	25	25	25	25	25
<i>Кол-во шагов</i>	-	2	2	2	2	2
<i>Кол-во положений</i>	-	3	3	3	3	3
Высота сиденья, ±10 мм	430	400	400	400	400	400
Высота спинки, ±10 мм	410	410	410	410	410	410
Угол наклона спинки, ±1 градус	-	85-105	85-105	85-105	85-105	85-105
<i>Шаг регулировки, градус</i>	-	5	5	5	5	5
<i>Кол-во шагов</i>	-	4	4	4	4	4
<i>Кол-во положений</i>	-	5	5	5	5	5
Высота подлокотника, ±1 мм	190-280	190-280	190-280	190-280	190-280	190-280
<i>Шаг регулировки, мм</i>	10	10	10	10	10	10
<i>Кол-во шагов</i>	9	9	9	9	9	9
<i>Кол-во положений</i>	10	10	10	10	10	10
Расстояние от подлокотника до спинки, ± 10 мм	230	230	230	230	230	230
Длина подножки, ±1 мм	420-540	270-370	270-370	270-370	270-370	270-370
<i>Шаг регулировки, мм</i>	20	20	20	20	20	20
<i>Кол-во шагов</i>	6	5	5	5	5	5
<i>Кол-во положений</i>	7	6	6	6	6	6
Диаметр обода ручного привода, ±10 мм	490	490	490	490	490	490
Масса, кг, не более	12,0	16	16	16	16	16
Масса самой тяжелой части, кг, не более	9,0	13	13	13	13	13
Максимальная допускаемая	80	80	80	80	80	80

нагрузка, кг						
Высота препятствия, мм, не более	40	40	40	40	40	40
Статическая устойчивость при спуске, ± 1 градус	10	10	10	10	10	10
Статическая устойчивость при подъеме, ± 1 градус	10	10	10	10	10	10
Статическая устойчивость боковая, ± 1 градус	10	10	10	10	10	10
Минимальный радиус поворота, ± 70 мм	1050	1050	1050	1050	1050	1050

6.7.2 Конструкция и функциональные характеристики Кресло-коляски Ortonica Puma представлены в таблице 14.

Таблица 14

Вариант исполнения	Puma 100	Puma 200	Puma 300	Puma 400	Puma 500	Puma 600
Рама						
Исполнение крестообразной конструкции	2 трубная	2 трубная	2 трубная	2 трубная	2 трубная	2 трубная
Подголовник						
Наличие	-	-	-	+	+	+
Съемный	-	-	-	+	+	+
Регулируемый по высоте	-	-	-	+	+	+
Регулируемый по углу наклона	-	-	-	+	+	+
Регулируемый по обхвату головы	-	-	-	+	+	+
Спинка						
Съемная	-	-	-	-	-	-
Регулируемая по высоте	-	-	-	-	-	-
Регулируемая по углу наклона	-	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+(шестигранник)
Складная	+(фиксатор)	-	-	-	-	-
Подушка для спинки	*+	+	+	+	+	+
Ремни натяжения	-	+	+	+	+	+
Распорка для придания жесткости	-	+	+	+	+	+
Оперативная регулировка угла наклона	-	-	-	-	-	-

Боковые поддержки	-	-	-	-	-	+
Ручки для сопровождающего лица						
Регулируемые по высоте	-	+	+	+	+	+
		(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)
Система торможения	-	-	-	-	+	-
Фиксаторы регулировок спинки	-	-	-	-	-	-
Распорка для придания жесткости	-	-	-	-	-	-
Подлокотники						
Откидные	-	-	-	-	-	-
Съемные	+	+	+	+	+	+
		б/с	б/с	б/с	б/с	б/с
Регулируемые по высоте	+	+	+	+	+	+
	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)
Регулируемые по глубине	-	-	-	-	-	-
Боковые щитки	+	+	+	+	+	+
Столик	-	-	+	+	+	+
Сиденье						
Регулируемое по глубине	-	+	+	+	+	+
Ремни натяжения	-	+	+	+	+	+
Подушка для сиденья	*+	+	+	+	+	+
Ремни безопасности	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Подножки						
Откидные	+	+	+	+	+	+
Съемные	+	+	+	+	+	+
	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с
Регулируемые по высоте	+	+	+	+	+	+
	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)
Регулируемые по углу наклона	-	-	-	-	-	-
Упоры для голени	-	-	-	-	-	-
Упор для коленей	-	-	-	-	-	-
Ремень для голени	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Ремень для фиксации стопы	-	+	+	+	+	+
Опоры для стоп откидные	+	+	+	+	+	+
Опоры для стоп регулируемые по углу наклона	+	+	+	+	+	+
		(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)
Передние колеса						

Тип	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические
Регулируемые по вертикали	-	+	+	+	+	+
Амортизаторы	-	-	-	-	-	-
Быстросъемные	-	-	-	-	+	+
Передняя вилка регулируемая по углу наклона	-	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+(шестигранник)
Задние колеса						
Тип	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические
Регулируемые по вертикали	-	+	+	+	+	+
Регулируемые по горизонтали	-	+	+	+	+	+
Амортизаторы	-	-	-	-	-	-
Быстросъемные	-	+	+	+	+	+
Антипрокидыватель						
Наличие	-	+	+	+	+	+
Быстросъемный	-	+	+	+	+	+
Регулируемый	-	+(кнопочный фиксатор)	+(кнопочный фиксатор)	+(кнопочный фиксатор)	+(кнопочный фиксатор)	+(кнопочный фиксатор)

* при необходимости
б/с - быстросъемные

6.8 Кресло-коляска Ortonica Comfort предназначена для пользования в положении сидя малоподвижных пользователей, в том числе больных ДЦП, имеет подголовник, регулируемый по обхвату головы, боковую поддержку, абдуктор, регулируемую ориентацию сиденья, управляется пациентом или сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складывается для удобства транспортировки. Варианты исполнения отличаются комплектацией, конструкцией, функциональными элементами и возможностью их регулировки. Каждый вариант исполнения Кресла-коляски имеет следующие ширины сиденья: 380 мм; 405 мм; 430 мм; 455 мм; 480 мм; 505 мм; 530 мм; 560 мм.

Кресло-коляска Ortonica Comfort представлена на Рис. 8 на примере варианта исполнения Comfort 600.



- | | |
|--|--|
| 1. Подголовник | 11. Опоры для стоп. |
| 2. Ручка для сопровождающего лица. | 12. Подножка, регулируемая по углу наклона тип 01. |
| 3. Рукоятка тормоза для сопровождающего лица. | 13. Упор для голени |
| 4. Фиксатор высоты ручки для сопровождающего лица | 14. Упоры для коленей |
| 5. Боковая поддержка, тип 01 | 15. Подушка для сиденья, тип 04. |
| 6. Приводной обод заднего колеса. | 16. Абдуктор |
| 7. Заднее колесо пневматическое. | 17. Подлокотник. |
| 8. Быстросъемная ось заднего колеса. | 18. Подушка для спинки, тип 06 |
| 9. Переднее колесо, самоориентирующееся. | 19. Рычаг стояночного тормоза |
| 10. Отверстия для регулировки самоориентирующегося колеса. | |

Рис. 8 Кресло-коляска Comfort 600

6.8.1 Технические характеристики Кресло-коляски Ortonica Comfort представлены в таблице 15.

Таблица 15

Параметр	Вариант исполнения												
	Comfort 100	Comfort 150	Comfort 200	Comfort 250	Comfort 300	Comfort 350	Comfort 400	Comfort 450	Comfort 500	Comfort 550	Comfort 600	Comfort 650	Comfort 700
Ширина коляски, ±10 мм	600; 625; 650; 675; 700; 725; 750; 780		575; 600; 625; 650; 675; 700; 725; 755						590; 615; 640; 665; 700; 720; 750; 770			605; 630; 655; 680; 705; 730; 755; 785	
Ширина сиденья, ±10 мм	380; 405; 430; 455; 480; 505; 530; 560												
Угол наклона сиденья, ±1°	4												
Минимальная высота коляски, мм	1080	1200	940	940	940	940	1000	880	880	880	1135	1135	1135
Длина коляски, мм	1030	1200	1100	1100	1100	1150	1100	1150	1150	1150	1100	1100	1100
Ширина коляски в сложенном виде, ±10 мм	355	330	310	310	310	310	310	320	320	320	630	630	630
Минимальная высота коляски в сложенном виде, мм	505	770	740	740	740	740	720	880	880	880	610	610	610
Длина коляски в сложенном виде, ±10 мм	830	850	840	840	840	840	840	900	900	900	900	900	900
Глубина сиденья, ±10 мм	340	410-510	420-545	420-545	420-545	420-545	400-525	400-500	400-500	400-500	475-535	475-535	475-535
Шаг регулировки, мм	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	плавная	плавная	плавная
Кол-во шагов	-	4	5	5	5	5	5	4	4	4			
Кол-во положений	-	5	6	6	6	6	6	5	5	5			
Высота сиденья, ±10 мм	550	450	450	450	450	450	450	500	500	500	500	500	500
Высота спинки, ±10 мм	530	430-530	500-600	500-600	500-600	500-600	500-600	450-500	450-500	450-500	520	520	520
Шаг регулировки, мм	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-
Кол-во шагов	-	4	4	4	4	4	4	2	2	2	-	-	-
Кол-во положений	-	5	5	5	5	5	5	3	3	3	-	-	-
Угол наклона спинки, ±1 градус	90-130	90	90-130	90-125	90-125	90-125	90-130	90-130	90-130	90-130	80-140	80-140	80-140
Шаг регулировки, градус	плавная	-	5	5	5	5	10	плавная	плавная	плавная	плавная	плавная	плавная
Кол-во шагов		-	7	7	7	7	4						
Кол-во положений		-	8	8	8	8	5						
Высота подлокотника, ±1 мм	175	230-260	225-265	225-265	225-265	225-265	225-255	160-230	160-230	160-230	120-230	120-230	120-230
Шаг регулировки, мм	-	15	20	20	20	20	15	плавная	плавная	плавная	плавная	плавная	плавная
Кол-во шагов	-	2	2	2	2	2	2						
Кол-во положений	-	3	3	3	3	3	3						
Расстояние от подлокотника до спинки, ± 10 мм	270	270, 370	290, 340, 400	290, 340, 400	290, 340, 400	290, 340, 400	290, 310, 360, 400	290, 310, 360, 400	290, 310, 360, 400	290, 310, 360, 400	290	290	290
Шаг регулировки, мм	-	100	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	20; 50; 40	20; 50; 40	20; 50; 40	20; 50; 40	-	-	-
Кол-во шагов	-	1	2	2	2	2	3	3	3	3	-	-	-
Кол-во положений	-	2	3	3	3	3	4	4	4	4	-	-	-
Длина подножки, ±1 мм	540-640	320-430	350-450	320-430	320-430	320-420	530-600	350-450	320-420	320-420	470-620	470-620	470-620
Шаг регулировки, мм	20	22	плавная	22	22	20	плавная	плавная	20	20	25	25	25

Кол-во шагов	5	5		5	5	5			5	5	6	6	6
Кол-во положений	6	6		6	6	6			6	6	7	7	7
Диапазон регулирования угла наклона подножки, ±1 градус	130-180	120-180	-	120-180	120-180	110-185	110-185	-	110-185	110-185	90-180	90-180	90-180
Шаг регулировки, градус			-					-					
Кол-во шагов	плавная	плавная	-	плавная	плавная	плавная	плавная	-	плавная	плавная	плавная	плавная	плавная
Кол-во положений			-					-					
Диаметр обода ручного привода, ±10 мм	430	430	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Масса, кг, не более	23	21	21	22	22	22	22	18	18	18	25	25	25
Масса самой тяжелой части, кг, не более	16	14	14	15	15	15	15	11	11	11	18	18	18
Максимальная допускаемая нагрузка, кг	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Высота препятствия, мм, не более	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Статическая устойчивость при спуске, ±1 градус	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Статическая устойчивость при подъеме, ±1 градус	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Статическая устойчивость боковая, ±1 градус	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Минимальный радиус поворота, ±70 мм	1080	1080	1060	1060	1060	1060	1060	1070	1070	1070	1090	1090	1090

6.8.2 Конструкция и функциональные характеристики Кресло-коляски Ortonica Comfort представлены в таблице 16.

Таблица 16

Вариант исполнения	Comfort 100	Comfort 150	Comfort 200	Comfort 250	Comfort 300	Comfort 350	Comfort 400	Comfort 450	Comfort 500	Comfort 550	Comfort 600	Comfort 650	Comfort 700
Рама													
Исполнение крестообразной конструкции	2 трубная	3 трубная	3 трубная	3 трубная	3 трубная	3 трубная	3 трубная	2 трубная	2 трубная	3 трубная	-	-	-
Подголовник													
Наличие	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Съемный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Регулируемый по высоте	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)
Регулируемый по углу наклона	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)
Регулируемый по обхвату головы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	(фиксатор)	(фиксатор)

Спинка													
Съемная	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Регулируемая по высоте	-	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+(шестигранник)	-	-	-
Регулируемая по углу наклона	+	-	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Складная	+(фиксатор)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	горизонтально	горизонтально	горизонтально
Подушка для спинки	+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	+	+	+
Ремни натяжения	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-
Распорка для придания жесткости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оперативная регулировка угла наклона	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	+	+
Боковые поддержки	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+
Пятиточечный ремень	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ручки для сопровождающего лица													
Регулируемые по высоте	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(кнопочный фиксатор)
Система торможения	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+
Фиксаторы регулировок спинки	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Распорка для придания жесткости	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Подлокотники													
Откидные	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Съемные	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)
Регулируемые по высоте	-	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+(кнопочный фиксатор)	+(кнопочный фиксатор)	+(кнопочный фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)
Регулируемые по глубине	-	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+(кнопочный фикса-)	+(кнопочный фикса-)	+(кнопочный фикса-)	-	-	-

								тор)	тор)				
Боковые щитки	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Сиденье													
Регулируемое по глубине	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ремни натяжения	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-
Подушка для сиденья	+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	+	+	+
Ремни безопасности	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	*+	*+	+
Абдуктор	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
Подножки													
Откидные	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Съемные	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с
Регулируемые по длине	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	(кнопочный фиксатор)	(фиксатор)	(шести-гранник)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(шести-гранник)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(кнопочный фиксатор)
Регулируемые по углу наклона	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
	(рычаг)	(рычаг)									(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)
Упоры для голени	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
Упор для коленей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Ремень для голени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремень для фиксации стопы	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Опоры для стоп откидные	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Опоры для стоп регулируемые по углу наклона	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
		(шести-гранник)	(шести-гранник)	(шести-гранник)	(шести-гранник)	(шести-гранник)	(шести-гранник)	(шести-гранник)	(шести-гранник)				
Передние колеса													
Тип	цельнолитые/пневматические	цельнолитые/пневматические	цельнолитые/пневматические	цельнолитые/пневматические	цельнолитые/пневматические	цельнолитые/пневматические	цельнолитые/пневматические	цельнолитые/пневматические	цельнолитые/пневматические	цельнолитые/пневматические	цельнолитые/пневматические	цельнолитые/пневматические	цельнолитые/пневматические
Регулируемые по вертикали	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Амортизаторы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Быстросъемные	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+
Передняя вилка регулируемая по углу наклона	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
								(шести-гранник)	(шести-гранник)	(шести-гранник)		(шести-гранник)	(шести-гранник)
Задние колеса													
Тип	цельноли-	цельноли-	цельноли-	цельноли-	цельноли-	цельноли-	цельноли-	цельноли-	цельноли-	цельноли-	цельноли-	цельноли-	цельноли-


	тые или пневмати- ческие	тые или пневмати- ческие	тые или пневмати- ческие	тые или пневмати- ческие	тые или пневмати- ческие	тые или пневмати- ческие	тые или пневмати- ческие	тые или пневмати- ческие	тые или пневмати- ческие	тые или пневмати- ческие	тые или пневмати- ческие	тые или пневмати- ческие	тые или пневмати- ческие
Регулируемые по вертикали	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Регулируемые по горизонтали	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Амортизаторы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Быстросъемные	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Антипрокидыватель													
Наличие	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Быстросъемный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Регулируемый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)

* при необходимости

б/с - быстросъемные

6.9 Кресло-коляска Ortonica Control One предназначена для пользования в положении сидя, имеет дополнительный механизм управления одной рукой (требуется дополнительная установка приводной оси механизма управления одной рукой), управляется пациентом или сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складывается для удобства транспортировки, варианты исполнения отличаются комплектацией, конструкцией, функциональными элементами и возможностью их регулировки. Каждый вариант исполнения Кресла-коляски имеет следующие ширины сиденья: 380 мм; 405 мм; 430 мм; 455 мм; 480 мм; 505 мм; 530 мм; 560 мм.

Кресло-коляска Ortonica Control One представлена на Рис. 9 на примере варианта исполнения Control One 300.

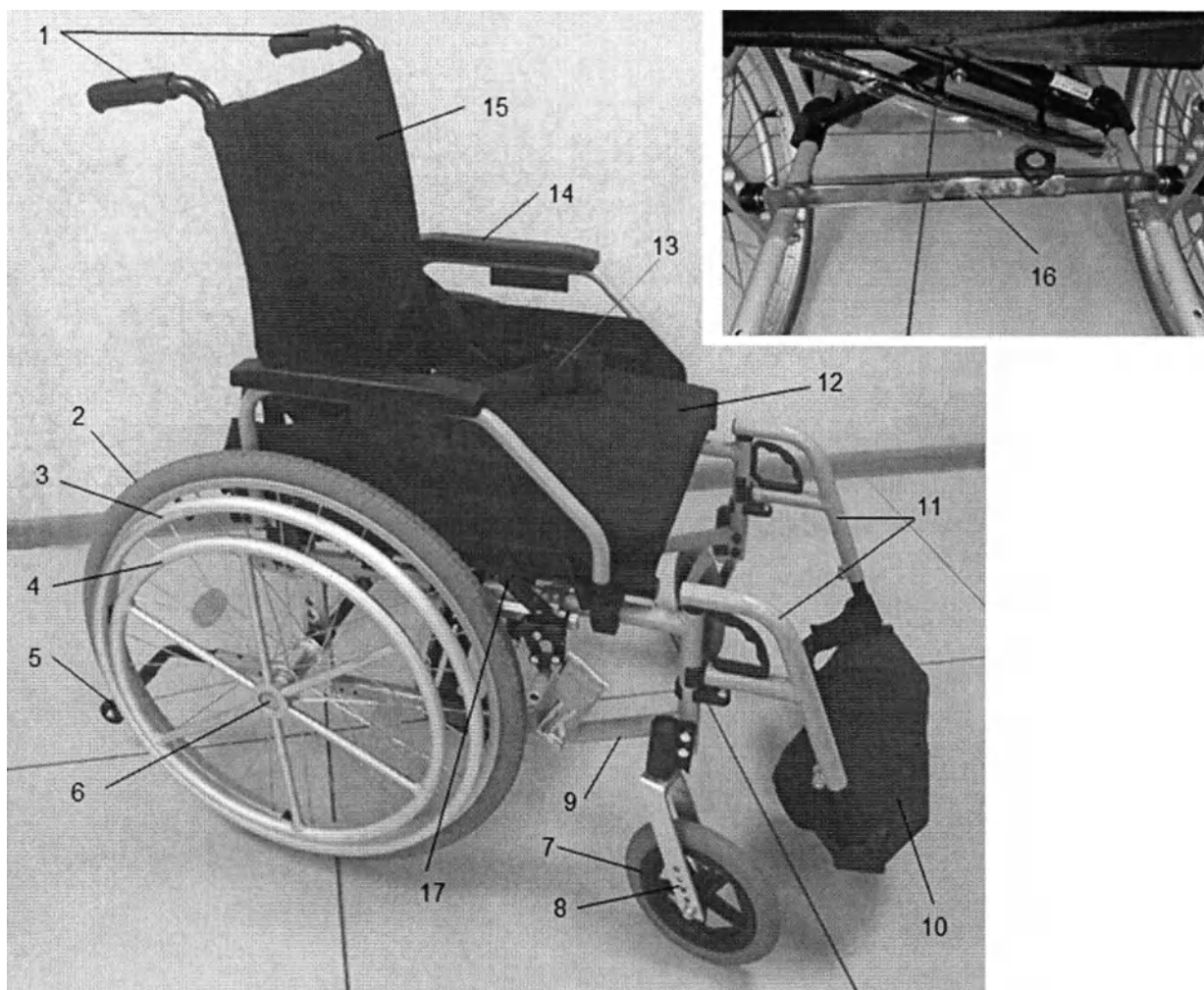

1. Ручки для сопровождающего лица.
2. Заднее колесо пневматическое, тип 03, с двойным приводом
3. Приводной обод заднего колеса.
4. Приводной обод механизма управления одной рукой
5. Антипрокидыватель тип 04.
6. Быстросъемная ось заднего колеса.
7. Переднее колесо, самоориентирующееся.
8. Отверстия для регулировки самоориентирующегося колеса.
9. Рама Кресла-коляски

10. Опоры для стоп.
11. Подножка, тип 06.
12. Подушка для сиденья, тип 01.
13. Ремень безопасности.
14. Подлокотник.
15. Спинка
16. Приводная ось механизма управления одной рукой
17. Рычаг стояночного тормоза

Рис. 9 Кресло-коляска Control One 300

6.9.1 Технические характеристики Кресло-коляски Ortonica Control One представлены в таблице 17.

Таблица 17

Параметр	Вариант исполнения					
	Control One 100	Control One 200	Control One 300	Control One 400	Control One 500	Control One 600
Ширина коляски, ±10 мм	605; 630; 655; 680; 705; 730; 755; 785		590; 610; 640; 670; 690; 710; 740; 770			
Ширина сиденья, ±10 мм	380; 405; 430; 455; 480; 505; 530; 560					
Угол наклона сиденья, ±1°	4					
Минимальная высота ко- ляски, мм	900	900	900	900	900	900
Длина коляски, ±10 мм	1040	1040	1170	1170	1170	1170
Ширина коляски в сложен- ном виде, ±10 мм	350	350	670	670	670	670
Минимальная высота ко- ляски в сложенном виде, мм	900	900	670	670	670	670
Длина коляски в сложенном виде, ±10 мм	770	770	850	850	850	850
Глубина сиденья, ±10 мм	430	430	420-520	420-520	420-520	420-520
Шаг регулировки, мм	-	-	25	25	25	25
Кол-во шагов	-	-	4	4	4	4
Кол-во положений	-	-	5	5	5	5
Высота сиденья, ±10 мм	470	470	450	450	450	450
Высота спинки, ±10 мм	400-500	400-500	400-500	400-500	400-500	400-500
Шаг регулировки, мм	25	25	25	25	25	25
Кол-во шагов	4	4	4	4	4	4
Кол-во положений	5	5	5	5	5	5
Угол наклона спинки, ±1 градус	90	90	90	90	90-130	90-130
Шаг регулировки, градус	-	-	-	-	10	10
Кол-во шагов	-	-	-	-	4	4
Кол-во положений	-	-	-	-	5	5
Высота подлокотника, ±1 мм	225-255	225-295	225-255	225-295	225-255	225-255
Шаг регулировки, мм	15	плавная	15	плавная	15	15
Кол-во шагов	2		2		2	2
Кол-во положений	3		3		3	3
Расстояние от подлокотника до спинки, ± 10 мм	300	300, 330, 390, 420	300	300-330-390-420	300	300
Шаг регулировки, мм	-	30, 60	-	30, 60	-	-
Кол-во шагов	-	3	-	3	-	-
Кол-во положений	-	4	-	4	-	-
Длина подножки, ±1 мм	440-540	440-540	350-450	350-450	350-450	350-450
Шаг регулировки, мм	плавная	плавная	плавная	плавная	плавная	плавная
Кол-во шагов						
Кол-во положений						

Диаметр обода ручного привода, ±10 мм	520	520	520	520	520	520
Масса, кг, не более	23	23	21	21	21	21
Масса самой тяжелой части, кг, не более	16	16	14	14	14	14
Максимальная допускаемая нагрузка, кг	130	130	130	130	130	130
Высота препятствия, мм, не более	40	40	40	40	40	40
Статическая устойчивость при спуске, ±1 градус	10	10	10	10	10	10
Статическая устойчивость при подъеме, ±1 градус	10	10	10	10	10	10
Статическая устойчивость боковая, ±1 градус	10	10	10	10	10	10
Минимальный радиус поворота, ±70 мм	1090	1090	1070	1070	1070	1070

6.9.2 Конструкция и функциональные характеристики Кресло-коляски Ortonica Control One представлены в таблице 18.

Таблица 18

Вариант исполнения	Control One 100	Control One 200	Control One 300	Control One 400	Control One 500	Control One 600
Рама						
Исполнение крестообразной конструкции	3 трубная	3 трубная	3 трубная	3 трубная	3 трубная	4 трубная
Подголовник						
Наличие	-	-	-	-	-	-
Спинка						
Съемная	-	-	+	+	+	+
Регулируемая по высоте	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)	+(фиксатор)
Регулируемая по углу наклона	-	-	-	-	+	+
Складная	-	-	-	-	-	-
Подушка для спинки	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Ремни натяжения	-	-	-	-	-	-
Распорка для придания жесткости	-	-	-	-	-	-
Оперативная регулировка угла наклона	-	-	-	-	+	+
Боковые поддержки	-	-	-	-	-	-

Ручки для сопровождающего лица						
Регулируемые по высоте	+	+	+	+	+	+
	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)	(фиксатор)
Система торможения	-	-	-	-	-	+
Фиксаторы регулировок спинки	-	-	-	-	-	-
Распорка для придания жесткости	-	-	-	-	-	-
Подлокотники						
Откидные	+	+	+	+	+	+
Съемные	+	+	+	+	+	+
	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с
Регулируемые по высоте	+	+	+	+	+	+
	(шестигранник)	(кнопочный фиксатор)	(шестигранник)	(кнопочный фиксатор)	(шестигранник)	(шестигранник)
Регулируемые по глубине	+	+	+	+	+	+
	(шестигранник)	(кнопочный фиксатор)	(шестигранник)	(кнопочный фиксатор)	(шестигранник)	(шестигранник)
Боковые щитки	+	+	+	+	+	+
Сиденье						
Регулируемое по глубине	-	-	+	+	+	+
Ремни натяжения	-	-	-	-	-	-
Подушка для сиденья	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Ремни безопасности	*+	*+	+	+	+	+
Подножки						
Откидные	+	+	+	+	+	+
Съемные	+	+	+	+	+	+
	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с
Регулируемые по длине	+	+	+	+	+	+
	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)
Регулируемые по углу наклона	-	-	-	-	-	-
Упоры для голени	-	-	-	-	-	-
Упор для коленей	-	-	-	-	-	-
Ремень для голени	+	+	-	-	-	-
Ремень для фиксации стопы	-	-	+	+	+	+
Опоры для стоп откидные	+	+	+	+	+	+
Опоры для стоп регулируемые по углу наклона	-	-	+	+	+	+
			(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)
Передние колеса						

Тип	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические
Регулируемые по вертикали	+	+	+	+	+	+
Амортизаторы	-	-	-	-	-	-
Быстросъемные	-	-	-	+	-	-
Передняя вилка регулируемая по углу наклона	-	-	-	-	-	-
Задние колеса						
Тип	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические
Регулируемые по вертикали	+	+	+	+	+	+
Регулируемые по горизонтали	+	+	+	+	+	+
Амортизаторы	-	-	-	-	-	-
Быстросъемные	+	+	+	+	+	+
Приводная ось	+	+	+	+	+	+
	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с	б/с
Антипрокидыватель						
Наличие	+	+	+	+	+	+
Быстросъемный	+	+	+	+	+	+
Регулируемый	-	+	+	+	+	+
		(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)

* при необходимости

б/с - быстросъемные

6.10 Кресло-коляска Ortonica Active Life предназначена для пользования в положении сидя для активной эксплуатации, имеет регулируемую по высоте спинку, управляется пациентом или сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складывается для удобства транспортировки, варианты исполнения отличаются комплектацией, конструкцией, функциональными элементами и возможностью их регулировки. Каждый вариант исполнения Кресла-коляски Ortonica Active Life имеет следующие ширины сиденья: 330 мм, 355 мм, 380 мм; 405 мм; 430 мм; 455 мм; 480 мм; 505 мм; 530 мм; 560 мм.

Кресло-коляска Ortonica Active Life снабжена ручным стояночным тормозом и ремнями безопасности.

Кресло-коляска Ortonica Active Life представлена на Рис. 10 на примере варианта исполнения Active Life 9000



1. Ручка для сопровождающего лица.
2. Заднее колесо пневматическое тип 02
3. Приводной обод заднего колеса.
4. Быстросъемная ось заднего колеса
5. Антипрокидыватель.
6. Рычаг стояночного тормоза
7. Переднее колесо, самоориентирующееся.
8. Опора для стоп.

9. Ремень для голени.
10. Рама Кресла-коляски.
11. Подушка для сиденья тип 02.
12. Ремень безопасности
13. Боковой щиток.
14. Подлокотник.
15. Подушка для спинки тип 03

Рис. 10 Кресло-коляска Active Life 9000

6.10.1 Технические характеристики Кресло-коляски Ortonica Active Life представлены в таблице 19.

Таблица 19

Параметр	Вариант исполнения								
	Active Life 1000	Active Life 2000	Active Life 3000	Active Life 4000	Active Life 5000	Active Life 6000	Active Life 7000	Active Life 8000	Active Life 9000
Ширина коляски, ±10 мм	530; 550; 575; 600; 625; 650; 675; 700; 725; 750		510; 535; 560; 585; 610; 635; 660; 685; 710; 740		520; 550; 570; 600; 620; 650; 670; 700; 720; 750				
Ширина сиденья, ±10 мм	330; 355; 380; 405; 430; 455; 480; 505; 530; 560								
Угол наклона сиденья, ±1°	4								
Минимальная высота коляски, мм	765	745	740	740	770	770	805	805	805
Длина коляски, ±10 мм	800	800	810	810	920	920	840	840	840
Ширина коляски в сложенном виде, ±10 мм	300	300	320	320	320	320	670	670	670
Минимальная высота коляски в сложенном виде, мм	765	745	710	710	770	770	540	540	540
Длина коляски в сложенном виде, ±10 мм	800	800	680	680	920	920	600	600	600
Глубина сиденья, ±10 мм	400	400	400	400	400	400	410-485	410-485	410-485
Шаг регулировки, мм	-	-	-	-	-	-	15	15	15
Кол-во шагов	-	-	-	-	-	-	5	5	5
Кол-во положений	-	-	-	-	-	-	7	7	7
Высота сиденья, ±10 мм	460	460-500	460-500	460-500	415-530	415-530	510-550	510-550	510-550
Шаг регулировки, мм	-	20	20	20	13	13	20	20	20
Кол-во шагов	-	2	2	2	9	9	2	2	2
Кол-во положений	-	3	3	3	12	12	3	3	3
Высота спинки, ±10 мм	340	340	300-360	300-360	350-400	300-400	300-400	300-400	300-400
Шаг регулировки, мм	-	-	20	20	13	13	плавная	плавная	плавная
Кол-во шагов	-	-	3	3	4	4			
Кол-во положений	-	-	4	4	5	5			
Угол наклона спинки, ±1 градус	90	90	73-95	73-95	90	90	73-108	73-108	73-108
Шаг регулировки, градус	-	-	плавная	плавная	-	-	7	7	7
Кол-во шагов	-	-			-	-	5	5	5
Кол-во положений	-	-			-	-	6	6	6
Высота подлокотника, ±1 мм	160-260	160-260	205-245	205-245	-	-	-	205-245	205-245
Шаг регулировки, мм	плавная	плавная	20	20	-	-	-	20	20
Кол-во шагов			2	2	-	-	-	2	2
Кол-во положений			3	3	-	-	-	3	3
Расстояние от подлокотника до	310	310	315	315	-	-	-	315	315

спинки, ± 10 мм									
Длина подножки, ±1 мм	410-440	410-440	470-560	470-560	340-430	340-430	530-590	530-590	530-590
Шаг регулировки, мм	30	30	15	15	15	15	15	15	15
Кол-во шагов	1	1	6	6	6	6	4	4	4
Кол-во положений	2	2	7	7	7	7	5	5	5
Диаметр обода ручного привода, ±10 мм	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Масса, кг, не более	13	13	14	14	14	12	12	12	13
Масса самой тяжелой части, кг, не более	10	10	11	11	11	9	9	9	10
Максимальная допускаемая нагрузка, кг	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Высота препятствия, мм, не более	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Статическая устойчивость при спуске, ±1 градус	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Статическая устойчивость при подъеме, ±1 градус	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Статическая устойчивость боковая, ±1 градус	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Минимальный радиус поворота, ±70 мм	1050	1050	1040	1040	1050	1050	1050	1050	1050

6.10.2 Конструкция и функциональные характеристики Кресло-коляски Ortonica Active Life представлены в таблице 20.

Таблица 20

Вариант исполнения	Active Life 1000	Active Life 2000	Active Life 3000	Active Life 4000	Active Life 5000	Active Life 6000	Active Life 7000	Active Life 8000	Active Life 9000
Рама									
Исполнение крестообразной конструкции	4 трубная	4 трубная	4 трубная	4 трубная	2 трубная	3 трубная	-	-	-
Подголовник									
Наличие	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спинка									
Съемная	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Регулируемая по высоте	-	-	+	+	+	+	+	+	+
			(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)
Регулируемая по углу наклона	-	-	+	+	-	-	+	+	+
			(шестигранник)	(шестигранник)			(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)
Складная	-	-	-	-	-	-	+	+	+
							(рычаг)	(рычаг)	(рычаг)

Подушка для спинки	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ремни натяжения	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Распорка для придания жесткости	-	-	-	-	-	-	+	+	+
Оперативная регулировка угла наклона	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Боковые подержки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ручки для сопровождающего лица									
Регулируемые по высоте	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(фиксатор)	(фиксатор)
Система торможения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фиксаторы регулировок спинки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Распорка для придания жесткости	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подлокотники									
Откидные	-	-	+	-	-	-	-	+	+
Съемные	+	+	+	+	-	-	-	+	+
Регулируемые по высоте	+	+	+	+	-	-	-	+	+
	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)				(шестигранник)	(шестигранник)
Регулируемые по глубине	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Боковые щитки	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Сиденье									
Регулируемое по глубине	-	-	-	-	-	-	+	+	+
Ремни натяжения	+	+	+	+	-	-	+	+	+
Подушка для сиденья	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Ремни безопасности	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Подножки									
Откидные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Съемные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Регулируемые по длине	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(шестигранник)	(кнопочный фиксатор)	(кнопочный фиксатор)

Регулируемые по углу наклона	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Упоры для голеней	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Упор для коленей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремень для голеней	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+	*+
Ремень для фиксации стопы	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Опоры для стоп откидные	-	-	+	+	+	+	-	-	-
Опоры для стоп регулируемые по углу наклона	-	-	-	-	+	+	-	-	-
Передние колеса									
Тип	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические
Регулируемые по вертикали	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Регулируемые по горизонтали	-	-	-	-	+	+	-	-	-
Амортизаторы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Быстросъемные	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Передняя вилка регулируемая по углу наклона	-	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+	+	+(шестигранник)	+(шестигранник)	+(шестигранник)
Задние колеса									
Тип	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические	цельнолитые или пневматические
Регулируемые по вертикали	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Регулируемые по горизонтали	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Амортизаторы	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Быстросъемные	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Антипрокидыватель									
Наличие	+	+	+	+	-	-	-	-	+
Быстросъемный	+	+	+	+	-	-	-	-	+
Регулируемый	+(кнопочный фиксатор)	+(кнопочный фиксатор)	+(кнопочный фиксатор)	+(кнопочный фиксатор)	-	-	-	-	+(кнопочный фиксатор)

* при необходимости
б/с - быстросъемные

7. Комплектность

Комплект поставки медицинского изделия Кресло-коляска инвалидная Ortonica соответствует следующему ниже.

1.1 Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 200, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 200 ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка тип 01 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

1.2 Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 250, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 250, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 02 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

1.3 Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 300, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 300, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 01 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

1.4 Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 350, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 350, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 03 – 2 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

1.5 Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 400, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 400, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- переднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка тип 01 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

1.6 Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 450, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 450, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- переднее колесо тип 02 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка тип 01 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 01 – 2 шт. (при необходимости);

- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

1.7 Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 500, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 500, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 02 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

1.8 Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 550, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 550, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 02 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

1.9 Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 600, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 600, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 02 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

1.10 Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 650, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 650, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 02 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

1.11 Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 700, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 700, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 02 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

2.1 Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 100, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 100, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 03 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

2.2 Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 150, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 150, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- ручка для сопровождающего лица – 2 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);

- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 03 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

2.3 Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 200, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 200, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 04 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 02 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

2.4 Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 250, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 250, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 04 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

2.5 Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 300, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 300, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- спинка тип 01 – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 05 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 03 – 2 шт.;

- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

2.6 Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 350, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 350, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- спинка тип 02 – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка тип 06 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

2.7 Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 400, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 400, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- спинка тип 02 – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 02 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

2.8 Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 450, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 450, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;

- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка тип 06 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

2.9 Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 500, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 500, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка тип 06 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

2.10 Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 550, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 550, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка тип 06 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

2.11 Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 600, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 600, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;

- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 05 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

2.12 Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 650, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 650, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 05 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

2.13 Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 700, в составе:

- кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 700, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 06 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

3.1 Кресло-коляска инвалидная эргономичная Ortonica Desk 1000, в составе:

- кресло-коляска инвалидная эргономичная Ortonica Desk 1000, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 07а – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);

- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

3.2 Кресло-коляска инвалидная эргономичная Ortonica Desk 2000, в составе:

- кресло-коляска инвалидная эргономичная Ortonica Desk 2000, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 07а – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

3.3 Кресло-коляска инвалидная эргономичная Ortonica Desk 3000, в составе:

- кресло-коляска инвалидная эргономичная Ortonica Desk 3000, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 07а – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

3.4 Кресло-коляска инвалидная эргономичная Ortonica Desk 4000, в составе:

- кресло-коляска инвалидная эргономичная Ortonica Desk 4000, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 07а – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

3.5 Кресло-коляска инвалидная эргономичная Ortonica Desk 5000, в составе:

- кресло-коляска инвалидная эргономичная Ortonica Desk 5000, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 07а – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

3.6 Кресло-коляска инвалидная эргономичная Ortonica Desk 6000, в составе:

- кресло-коляска инвалидная эргономичная Ortonica Desk 6000, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 07а – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

3.7 Кресло-коляска инвалидная эргономичная Ortonica Desk 7000, в составе:

- кресло-коляска инвалидная эргономичная Ortonica Desk 7000, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 07б – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

3.8 Кресло-коляска инвалидная эргономичная Ortonica Desk 8000, в составе:

- кресло-коляска инвалидная эргономичная Ortonica Desk 8000, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);

- подножка тип 076 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

4.1 Кресло-коляска инвалидная с откидной спинкой Ortonica Recline 100, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с откидной спинкой Ortonica Recline 100, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 01 - 1 шт.;
- удлинитель спинки – 1 шт.;
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 04 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 05 – 1 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

4.2 Кресло-коляска инвалидная с откидной спинкой Ortonica Recline 200, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с откидной спинкой Ortonica Recline 200, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- спинка тип 03 – 1 шт.;
- распорка для жесткости – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 06 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 04 – 1 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

4.3 Кресло-коляска инвалидная с откидной спинкой Ortonica Recline 300, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с откидной спинкой Ortonica Recline 300, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- распорка для жесткости – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 06 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 04 – 1 шт.;

- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

4.4 Кресло-коляска инвалидная с откидной спинкой Ortonica Recline 400, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с откидной спинкой Ortonica Recline 400, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 03 – 1 шт.;
- держатель подголовника – 1 шт.;
- спинка тип 03 – 1 шт.;
- распорка для жесткости – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 06 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 04 – 1 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

4.5 Кресло-коляска инвалидная с откидной спинкой Ortonica Recline 500, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с откидной спинкой Ortonica Recline 500, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 05 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 04 – 1 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

4.6 Кресло-коляска инвалидная с откидной спинкой Ortonica Recline 600, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с откидной спинкой Ortonica Recline 600, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 05 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);

- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

4.7 Кресло-коляска инвалидная с откидной спинкой Ortonica Recline 700, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с откидной спинкой Ortonica Recline 700, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 03 – 1 шт.;
- держатель подголовника – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 06 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

4.8 Кресло-коляска инвалидная с откидной спинкой Ortonica Recline 800, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с откидной спинкой Ortonica Recline 800, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- держатель подголовника – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 06 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

5.1 Кресло-коляска инвалидная с независимой подвеской Ortonica Delux 600, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с независимой подвеской Ortonica Delux 600, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка тип 08 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

5.2 Кресло-коляска инвалидная с независимой подвеской Ortonica Delux 650, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с независимой подвеской Ortonica Delux 650, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка тип 08 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

5.3 Кресло-коляска инвалидная с независимой подвеской Ortonica Delux 700, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с независимой подвеской Ortonica Delux 700, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка тип 08 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

5.4 Кресло-коляска инвалидная с независимой подвеской Ortonica Delux 750, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с независимой подвеской Ortonica Delux 750, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка тип 05а – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

5.5 Кресло-коляска инвалидная с независимой подвеской Ortonica Delux 800, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с независимой подвеской Ortonica Delux 800, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка тип 05а – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

5.6 Кресло-коляска инвалидная с независимой подвеской Ortonica Delux 850, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с независимой подвеской Ortonica Delux 850, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка тип 05а – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

5.7 Кресло-коляска инвалидная с независимой подвеской Ortonica Delux 900, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с независимой подвеской Ortonica Delux 900, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- держатель подголовника – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 06 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

6.1 Кресло-коляска инвалидная малогабаритная Ortonica Home 50, в составе:

- кресло-коляска инвалидная малогабаритная Ortonica Home 50, ширина сиденья: 305 мм, 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 01 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

6.2 Кресло-коляска инвалидная малогабаритная Ortonica Home 60, в составе:

- кресло-коляска инвалидная малогабаритная Ortonica Home 60, ширина сиденья: 305 мм, 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 01 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

6.3 Кресло-коляска инвалидная малогабаритная Ortonica Home 70, в составе:

- кресло-коляска инвалидная малогабаритная Ortonica Home 70, ширина сиденья: 305 мм, 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 02 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 04 – 1 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

6.4 Кресло-коляска инвалидная малогабаритная Ortonica Home 80, в составе:

- кресло-коляска инвалидная малогабаритная Ortonica Home 80, ширина сиденья: 305 мм, 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);

- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 02 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 04 – 1 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

6.5 Кресло-коляска инвалидная малогабаритная Ortonica Home 90, в составе:

- кресло-коляска инвалидная малогабаритная Ortonica Home 90, ширина сиденья: 305 мм, 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 02 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 04 – 1 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

6.6 Кресло-коляска инвалидная малогабаритная Ortonica Home 100, в составе:

- кресло-коляска инвалидная малогабаритная Ortonica Home 100, ширина сиденья: 305 мм, 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 02 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 04 – 1 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

6.7 Кресло-коляска инвалидная малогабаритная Ortonica Home 110, в составе:

- кресло-коляска инвалидная малогабаритная Ortonica Home 110, ширина сиденья: 305 мм, 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 02 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 04 – 1 шт.;

- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

7.1 Кресло-коляска инвалидная детская повышенной комфортности Ortonica Puma 100, в составе:

- кресло-коляска инвалидная детская повышенной комфортности Ortonica Puma 100, ширина сиденья: 305 мм, 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 05 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

7.2 Кресло-коляска инвалидная детская повышенной комфортности Ortonica Puma 200, в составе:

- кресло-коляска инвалидная детская повышенной комфортности Ortonica Puma 200, ширина сиденья: 305 мм, 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 04 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 09 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

7.3 Кресло-коляска инвалидная детская повышенной комфортности Ortonica Puma 300, в составе:

- кресло-коляска инвалидная детская повышенной комфортности Ortonica Puma 300, ширина сиденья: 305 мм, 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 04 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- столик в составе: столешница – 1 шт., направляющие – 2 шт.;
- подножка тип 09 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

7.4 Кресло-коляска инвалидная детская повышенной комфортности Ortonica Puma 400, в составе:

- кресло-коляска инвалидная детская повышенной комфортности Ortonica Puma 400, ширина сиденья: 305 мм, 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 03 – 1 шт.;
- держатель подголовника – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 04 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- столик в составе: столешница – 1 шт., направляющие – 2 шт.;
- подножка тип 09 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

7.5 Кресло-коляска инвалидная детская повышенной комфортности Ortonica Puma 500, в составе:

- кресло-коляска инвалидная детская повышенной комфортности Ortonica Puma 500, ширина сиденья: 305 мм, 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- держатель подголовника – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 04 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- столик в составе: столешница – 1 шт., направляющие – 2 шт.;
- подножка тип 09 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

7.6 Кресло-коляска инвалидная детская повышенной комфортности Ortonica Puma 600, в составе:

- кресло-коляска инвалидная детская повышенной комфортности Ortonica Puma 600, ширина сиденья: 305 мм, 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- держатель подголовника – 1 шт. (при необходимости);
- боковая поддержка тип 02 – 2 шт.;
- кронштейн к боковой поддержке – 2 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 04 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- столик в составе: столешница – 1 шт., направляющие – 2 шт.;
- подножка тип 09 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);

- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

8.1 Кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 100, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 100, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 02 – 1 шт.;
- боковая поддержка тип 01 – 2 шт.;
- подушка для спинки тип 05 – 1 шт.;
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт.;
- абдуктор – 1 шт.;
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 04 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

8.2 Кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 150, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 150, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- держатель подголовника – 1 шт. (при необходимости);
- спинка тип 02 – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 04 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 05 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

8.3 Кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 200, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 200, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- держатель подголовника – 1 шт. (при необходимости);
- спинка тип 02 – 1 шт.;
- боковая поддержка тип 02 – 2 шт.;
- кронштейн к боковой поддержке – 2 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);

- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка тип 06 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

8.4 Кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 250, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 250, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- держатель подголовника – 1 шт. (при необходимости);
- спинка тип 02 – 1 шт.;
- распорка для жесткости – 1 шт.;
- боковая поддержка тип 02 – 2 шт.;
- кронштейн к боковой поддержке – 2 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 05 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

8.5 Кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 300, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 300, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- держатель подголовника – 1 шт. (при необходимости);
- спинка тип 02 – 1 шт.;
- распорка для жесткости – 1 шт.;
- боковая поддержка тип 02 – 2 шт.;
- кронштейн к боковой поддержке – 2 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 05 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт.;

- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

8.6 Кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 350, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 350, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- держатель подголовника – 1 шт. (при необходимости);
- спинка тип 02 – 1 шт.;
- распорка для жесткости – 1 шт.;
- боковая поддержка тип 02 – 2 шт.;
- кронштейн к боковой поддержке – 2 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 06 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

8.7 Кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 400, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 400, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- держатель подголовника – 1 шт. (при необходимости);
- распорка для жесткости – 1 шт.;
- боковая поддержка тип 02 – 2 шт.;
- кронштейн к боковой поддержке – 2 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 06 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

8.8 Кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 450, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 450, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- держатель подголовника – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка тип 06 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

8.9 Кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 500, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 500, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- держатель подголовника – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 06 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

8.10 Кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 550, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 550, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- держатель подголовника – 1 шт. (при необходимости);
- боковая поддержка тип 02 – 2 шт. (при необходимости);
- кронштейн к боковой поддержке – 2 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 06 – 2 шт.;
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт.;

- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

8.11 Кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 600, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 600, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 04 – 1 шт. (при необходимости);
- боковая поддержка тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- подлокотник – 2 шт.;
- подушка для спинки тип 06 – 1 шт.;
- подушка для сиденья тип 04 – 1 шт.;
- абдуктор – 1 шт.;
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 01 – 2 шт.;
- опора для стоп – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

8.12 Кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 650, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 650, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 04 – 1 шт. (при необходимости);
- боковая поддержка тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- подлокотник – 2 шт.;
- подушка для спинки тип 06 – 1 шт.;
- подушка для сиденья тип 04 – 1 шт.;
- абдуктор – 1 шт.;
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 01 – 2 шт.;
- опора для стоп – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

8.13 Кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 700, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 700, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подголовник тип 04 – 1 шт. (при необходимости);
- боковая поддержка тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- подлокотник – 2 шт.;
- подушка для спинки тип 06 – 1 шт.;
- подушка для сиденья тип 04 – 1 шт.;
- абдуктор – 1 шт.;
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 01 – 2 шт.;
- опора для стоп – 2 шт.;

- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

9.1 Кресло-коляска инвалидная с дополнительным механизмом управления одной рукой Ortonica Control One 100, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с дополнительным механизмом управления одной рукой Ortonica Control One 100, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- приводная ось механизма управления одной рукой – 1 шт.;
- подножка тип 02 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 06 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

9.2 Кресло-коляска инвалидная с дополнительным механизмом управления одной рукой Ortonica Control One 200, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с дополнительным механизмом управления одной рукой Ortonica Control One 200, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- приводная ось механизма управления одной рукой – 1 шт.;
- подножка тип 02 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

9.3 Кресло-коляска инвалидная с дополнительным механизмом управления одной рукой Ortonica Control One 300, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с дополнительным механизмом управления одной рукой Ortonica Control One 300, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- спинка тип 02 – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);

- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 1 шт.;
- заднее колесо тип 03 (пневматическое или цельнолитое) – 1 шт.;
- приводная ось механизма управления одной рукой – 1 шт.;
- подножка тип 06 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

9.4 Кресло-коляска инвалидная с дополнительным механизмом управления одной рукой Ortonica Control One 400, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с дополнительным механизмом управления одной рукой Ortonica Control One 400, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- спинка тип 02 – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 1 шт.;
- заднее колесо тип 03 (пневматическое или цельнолитое) – 1 шт.;
- приводная ось механизма управления одной рукой – 1 шт.;
- подножка тип 06 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

9.5 Кресло-коляска инвалидная с дополнительным механизмом управления одной рукой Ortonica Control One 500, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с дополнительным механизмом управления одной рукой Ortonica Control One 500, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- спинка тип 02 – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 1 шт.;
- заднее колесо тип 03 (пневматическое или цельнолитое) – 1 шт.;
- приводная ось механизма управления одной рукой – 1 шт.;
- подножка тип 06 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);

- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

9.6 Кресло-коляска инвалидная с дополнительным механизмом управления одной рукой Ortonica Control One 600, в составе:

- кресло-коляска инвалидная с дополнительным механизмом управления одной рукой Ortonica Control One 600, ширина сиденья: 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- спинка тип 02 – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 01 (пневматическое или цельнолитое) – 1 шт.;
- заднее колесо тип 03 (пневматическое или цельнолитое) – 1 шт.;
- приводная ось механизма управления одной рукой – 1 шт.;
- подножка тип 06 – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

10.1 Кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life 1000, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life 1000, ширина сиденья: 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

10.2 Кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life 2000, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life 2000, ширина сиденья: 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);

- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

10.3 Кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life 3000, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life 3000, ширина сиденья: 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 02 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

10.4 Кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life 4000, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life 4000, ширина сиденья: 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 02 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

10.5 Кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life 5000, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life 5000, ширина сиденья: 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 02 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;

- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).

10.6 Кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life 6000, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life 6000, ширина сиденья: 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 02 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

10.7 Кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life 7000, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life 7000, ширина сиденья: 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 02 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

10.8 Кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life 8000, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life 8000, ширина сиденья: 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);

- подушка для сиденья тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 02 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

10.9 Кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life 900, в составе:

- кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life 9000, ширина сиденья: 330 мм, 355 мм, 380 мм, 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм, 530 мм, 560 мм – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- заднее колесо тип 02 (пневматическое или цельнолитое) – 2 шт.;
- быстросъемная ось заднего колеса – 2 шт.;
- ремень для голени – 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ – 1 шт., ключ шестигранный 3 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 4 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 5 мм – 1 шт. (при необходимости); ключ шестигранный 6 мм – 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

8. Наличие в медицинском изделии лекарственных средств, применяемые материалы

Материалы животного или человеческого происхождения в медицинском изделии Кресло-коляска инвалидная Ortonica отсутствуют.

Лекарственные средства, фармацевтические субстанции в медицинском изделии Кресло-коляска инвалидная Ortonica отсутствуют.

Элементы Кресла-коляски, имеющие контакт с пациентом и обслуживающим персоналом, изготовлены или имеют покрытия из материалов, безопасность которых подтверждена в установленном порядке сертификатом соответствия, декларацией о соответствии или протоколом испытаний, а так же разрешенных к применению в медицинской практике.

В таблице 21 описаны основные материалы, применяемые для изготовления элементов Кресла-коляски, контактирующих менее 24 часов с неповрежденной кожей человека.

Таблица 21

Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica, варианты исполнения: Base 200, Base 250, Base 300, Base 350, Base 400, Base 450, Base 500, Base 550, Base 600, Base 650, Base 700	Сталь марки STKM11A, производитель Changzhou Hongtai Precision Steel Pipe Co., Ltd. (Китай) – рама коляски; быстросъемная ось заднего колеса; подножка, регулируемая по углу наклона тип 03; антипрокидыватель
	ABS пластик марки YU-012, производитель Dongguan Cheng Zhi Plastic Material Limited (Китай) – фиксатор для складывания спинки; боковые щитки; опора для стоп; рычаг стояночного тормоза; рукоятка тормоза для сопровождающего лица; кнопка быстросъемной оси заднего колеса; насос

	Полиуретан марки CH28R, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd. (Китай) - <i>рукоятка ручки для сопровождающего лица</i>
	Полиуретан марки PU3033, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd. (Китай) – <i>подлокотник</i> ;
	Ткань марки Оксфорд 420D, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – <i>спинка, сиденье; подушка для спинки тип 02; ремень для голени</i>
	Ткань сетка неопреновая марки TW11, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd., Китай - <i>подушка для спинки тип 01; подушка для сиденья тип 02</i>
	Алюминий марки 6063T5, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. (Китай) - <i>приводной обод заднего колеса</i>
	Алюминий марки 6061T6, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. (Китай) - <i>подножка тип 01, 02; набор инструментов</i>
	Нейлон марки VS-HT100, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd., Китай - <i>ремень для фиксации стоп; ремень безопасности</i> ;
2. Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica, варианты исполнения: Base Lite 100, Base Lite 150, Base Lite 200, Base Lite 250, Base Lite 300, Base Lite 350, Base Lite 400, Base Lite 450, Base Lite 500, Base Lite 550, Base Lite 600, Base Lite 650, Base Lite 700	Алюминий марки 6061T6, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. (Китай) – <i>рама коляски; подножка тип 03, 04, 05, 06; подножка, регулируемая по углу наклона тип 05, 06; антипрокидыватель тип 07; набор инструментов</i>
	Алюминий марки 6063T5, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. (Китай) - <i>приводной обод заднего колеса</i>
	Сталь марки STKM11A, производитель Changzhou Hongtai Precision Steel Pipe Co., Ltd. (Китай) – <i>быстросъемная ось заднего колеса; антипрокидыватель тип 02, 03, 04</i>
	ABS пластик марки YU- 012, производитель Dongguan Cheng Zhi Plastic Material Limited (Китай) – <i>фиксатор высоты ручек для сопровождающего лица; боковые щитки; опора для стоп; рычаг стояночного тормоза; рукоятка тормоза для сопровождающего лица; кнопка быстросъемной оси заднего колеса; насос</i>
	Полиуретан марки CH28R, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd. (Китай) - <i>рукоятка ручки для сопровождающего лица</i>
	Ткань марки Оксфорд 420D, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – <i>спинка тип 01, 02; сиденье; подушка для спинки тип 02; подушка для сиденья тип 01; ремень для голени</i>
	Полиуретан марки PU3033, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd. (Китай) – <i>подлокотник</i> ;
	Ткань сетка неопреновая марки TW11, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) - <i>подушка для спинки тип 01; подушка для сиденья тип 02</i>
	Нейлон марки VS-HT100, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – <i>ремень безопасности; ремень для фиксации стоп</i> ;
	Алюминий марки 6061T6, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. (Китай) – <i>рама коляски; подножка тип 07а, 07б; подножка, регулируемая по углу наклона тип 05, 06; антипрокидыватель тип 07; набор инструментов</i>
3. Кресло-коляска инвалидная эргономичная Ortonica, варианты исполнения: Desk 1000, Desk 2000, Desk 3000, Desk 4000, Desk 5000, Desk 6000, Desk 7000, Desk 8000	Алюминий марки 6063T5, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. (Китай) - <i>приводной обод заднего колеса</i>
	Сталь марки STKM11A, производитель Changzhou Hongtai Precision Steel Pipe Co., Ltd. (Китай) – <i>быстросъемная ось заднего колеса</i> ;
	ABS пластик марки YU- 012, производитель Dongguan Cheng Zhi Plastic Material Limited (Китай) – <i>фиксатор для складывания спинки; рычаг стояночного тормоза; рукоятка тормоза для сопровождающего лица</i> ;

	кнопка быстросъемной оси заднего колеса; опора для стоп; насос Полиуретан марки CH28R, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd. (Китай) - рукоятка ручки для сопровождающего лица Ткань марки Оксфорд 420D, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – боковые панели; спинка, сиденье; подушка для спинки тип 02; подушка для сиденья тип 01; ремень для голени Полиуретан марки PU3033, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd. (Китай) – подлокотник; Ткань сетка неопреновая марки TW11, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) - подушка для спинки тип 01; подушка для сиденья тип 02; Нейлон марки VS-HT100, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – ремень безопасности;
4. Кресло-коляска инвалидная с откидной спинкой Ortonica, варианты исполнения: Recline 100, Recline 200, Recline 300, Recline 400, Recline 500, Recline 600, Recline 700, Recline 800	Алюминий марки 6061T6, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. (Китай) – рама коляски; подножка тип 06; подножка, регулируемая по углу наклона тип 04, 05, 06; антипрокидыватель тип 07; набор инструментов Алюминий марки 6063T5, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. (Китай) - приводной обод заднего колеса; Сталь марки STKM11A, производитель Changzhou Hongtai Precision Steel Pipe Co., Ltd. (Китай) – рама коляски Recline 100; быстросъемная ось заднего колеса; антипрокидыватель тип 04, 05 ABS пластик марки YU- 012, производитель Dongguan Cheng Zhi Plastic Material Limited (Китай) – фиксатор подголовника; фиксатор высоты ручек для сопровождающего лица; боковые щитки; рычаг стояночного тормоза; рукоятка тормоза для сопровождающего лица; кнопка быстросъемной оси заднего колеса; опора для стоп; насос; Полиуретан марки CH28R, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd. (Китай) - рукоятка ручки для сопровождающего лица Ткань марки Оксфорд 420D, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – подголовник тип 01; спинка тип 03; сиденье; подушка для спинки тип 02; подушка для сиденья тип 01; ремень для голени; Кожзаменитель марки Ecotap, производитель Wenzhou Simple Trading Co., Ltd. (Китай) – подголовник тип 03; Ткань сетка неопреновая марки TW11, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) - подушка для спинки тип 01; подушка для сиденья тип 02 Полиуретан марки PU3033, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd. (Китай) – подлокотник; Нейлон марки VS-HT100, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – ремень безопасности; ремень регулировки угла наклона спинки; ремень натяжения спинки и сиденья; ремень для фиксации стоп;
5. Кресло-коляска инвалидная с независимой подвеской Ortonica, варианты исполнения: Delux 600, Delux 650, Delux 700, Delux 750, Delux 800, Delux 850, Delux 900.	Алюминий марки 6061T6, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. (Китай) – рама коляски; подножка тип 05а, 06; подножка, регулируемая по углу наклона тип 04, 05, 06; антипрокидыватель тип 07; набор инструментов; Алюминий марки 6063T5, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. (Китай) - приводной обод заднего колеса; Сталь марки STKM11A, производитель Changzhou Hongtai Precision Steel Pipe Co., Ltd. (Китай) – быстросъемная ось заднего колеса; антипрокидыватель тип 04, 05 ABS пластик марки YU- 012, производитель Dongguan Cheng Zhi Plastic

	Material Limited (Китай) – фиксатор подголовника; фиксатор высоты ручки для сопровождающего лица; рычаг стояночного тормоза; боковые щитки; кнопка быстросъемной оси заднего колеса; опора для стоп; насос;
	Полиуретан марки CH28R, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd. (Китай) - рукоятка ручки для сопровождающего лица
	Полиуретан марки PU3033, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd. (Китай) – подлокотник;
	Кожзаменитель марки Ecotar, производитель Wenzhou Simple Trading Co., Ltd. (Китай) – подголовник тип 03;
	Ткань марки Оксфорд 420D, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – спинка; сиденье; подушка для спинки тип 02; подушка для сиденья тип 01; ремень для голени;
	Ткань сетка неопреновая марки TW11, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) - подушка для спинки тип 01; подушка для сиденья тип 02;
	Нейлон марки VS-HT100, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – ремень безопасности; ремень натяжения спинки и сиденья; ремень для фиксации стоп;
6. Кресло-коляска инвалидная малогабаритная Ortonica, варианты исполнения: Home 50, Home 60, Home 70, Home 80, Home 90, Home 100, Home 110	Алюминий марки 6061T6, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. (Китай) – рама коляски; подножка тип 01, 02; набор инструментов;
	Алюминий марки 6063T5, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. (Китай) - приводной обод заднего колеса;
	Сталь марки STKM11A, производитель Changzhou Hongtai Precision Steel Pipe Co., Ltd. (Китай) – быстросъемная ось заднего колеса; антипрокидыватель тип 04,
	ABS пластик марки YU-012, производитель Dongguan Cheng Zhi Plastic Material Limited (Китай) – рычаг стояночного тормоза; рукоятка тормоза для сопровождающего лица; боковые щитки; кнопка быстросъемной оси заднего колеса; опора для стоп; насос;
	Полиуретан марки CH28R, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd. (Китай) - рукоятка ручки для сопровождающего лица
	Полиуретан марки PU3033, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd. (Китай) – подлокотник;
	Ткань марки Оксфорд 420D, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – спинка, сиденье; подушка для спинки тип 02; подушка для сиденья тип 01; ремень для голени;
	Ткань сетка неопреновая марки TW11, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) - подушка для спинки тип 01; подушка для сиденья тип 02;
	Нейлон марки VS-HT100, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – ремень безопасности
7. Кресло-коляска инвалидная детская повышенной комфортности Ortonica, варианты исполнения: Puma 100, Puma 200, Puma 300, Puma 400, Puma 500, Puma 600	Алюминий марки 6061T6, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. (Китай) – рама коляски; подножка тип 05, 06; набор инструментов;
	Алюминий марки 6063T5, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. (Китай) - приводной обод заднего колеса; антипрокидыватель тип 07;
	Сталь марки STKM11A, производитель Changzhou Hongtai Precision Steel Pipe Co., Ltd. (Китай) – быстросъемная ось заднего колеса;
	ABS пластик марки YU-012, производитель Dongguan Cheng Zhi Plastic Material Limited (Китай) – фиксатор подголовника; фиксатор высоты ручек для сопровождающего лица; рычаг тормоза; кнопка быстросъемной оси заднего колеса; опора для стоп; насос

	Полиуретан марки CH28R, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd. (Китай) – <i>рукоятка ручки для сопровождающего лица</i>
	Полиуретан марки PU3033, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd. (Китай) – <i>подлокотник; боковая поддержка тип 02;</i>
	Кожзаменитель марки Ecotap, производитель Wenzhou Simple Trading Co., Ltd. (Китай) – <i>подголовник тип 03;</i>
	Ткань марки Оксфорд 420D, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – <i>подушка для спинки тип 04; подушка для сиденья тип 01; ремень для голени;</i>
	Ткань сетка неопреновая марки TW11, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – <i>подушка для спинки тип 01; подушка для сиденья тип 03;</i>
	Нейлон марки VS-HT100, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – <i>ремень безопасности; ремень натяжения спинки и сиденья; ремень для фиксации стоп;</i>
	Акриловое стекло марки ACRYMA, производитель Shenzhen Zepacrylic Co., Ltd. – <i>столешница;</i>
8. Кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica, варианты исполнения: Comfort 100, Comfort 150, Comfort 200, Comfort 250, Comfort 300, Comfort 350, Comfort 400, Comfort 450, Comfort 500, Comfort 550, Comfort 600, Comfort 650, Comfort 700	Алюминий марки 6061T6, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. (Китай) – <i>рама коляски Comfort 100-550; подножка тип 06; подножка, регулируемая по углу наклона тип 04, 05, 06; набор инструментов;</i>
	Алюминий марки 6063T5, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. (Китай) – <i>приводной обод заднего колеса; антипрокидыватель тип 07;</i>
	Сталь марки STKM11A, производитель Changzhou Hongtai Precision Steel Pipe Co., Ltd. (Китай) – <i>рама коляски Comfort 600-700; быстросъемная ось заднего колеса; подножка, регулируемая по углу наклона тип 01; антипрокидыватель тип 04;</i>
	ABS пластик марки YU-012, производитель Dongguan Cheng Zhi Plastic Material Limited (Китай) – <i>фиксатор подголовника; опора для стоп; рычаг стояночного тормоза; рукоятка тормоза для сопровождающего лица; кнопка быстросъемной оси заднего колеса; насос</i>
	Полиуретан марки CH28R, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd. (Китай) – <i>рукоятка ручки для сопровождающего лица</i>
	Полиуретан марки PU3033, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd. (Китай) – <i>подлокотник коляски Comfort 100-550; боковая поддержка тип 02;</i>
	Кожзаменитель марки Ecotap, производитель Wenzhou Simple Trading Co., Ltd. (Китай) – <i>подголовник тип 03, 04;</i>
	Ткань марки Оксфорд 420D, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – <i>подголовник тип 02; боковая поддержка тип 01; подлокотник коляски Comfort 600-700; спинка тип 02; подушка для спинки тип 01, 02, 05, 06; подушка для сиденья тип 01, 04; абдуктор; ремень для голени;</i>
	Ткань сетка неопреновая марки TW11, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – <i>подушка для сиденья тип 02, 03;</i>
	Нейлон марки VS-HT100, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – <i>ремень безопасности; ремень натяжения спинки и сиденья; ремень для фиксации стоп;</i>
9. Кресло-коляска инвалидная с дополнительным механизмом управления одной рукой, варианты исполнения:	Алюминий марки 6061T6, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. (Китай) – <i>рама коляски; набор инструментов;</i>
	Алюминий марки 6063T5, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. (Китай) – <i>приводной обод заднего колеса; приводной обод механизма управления одной рукой; антипрокидыватель тип 07;</i>



Control One 100, Control One 200, Control One 300, Control One 400, Control One 500, Control One 600	Сталь марки STKM11A, производитель Changzhou Hongtai Precision Steel Pipe Co., Ltd. (Китай) – <i>быстросъемная ось заднего колеса; антипрокидыватель тип 04;</i>
	ABS пластик марки YU-012, производитель Dongguan Cheng Zhi Plastic Material Limited (Китай) – <i>фиксатор подголовника; рычаг стояночного тормоза; рукоятка тормоза для сопровождающего лица; боковые щитки; кнопка быстросъемной оси заднего колеса; насос;</i>
	Полиуретан марки CH28R, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd. (Китай) – <i>рукоятка ручки для сопровождающего лица</i>
	Полиуретан марки PU3033, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd. (Китай) – <i>подлокотник;</i>
	Кожзаменитель марки Ecotap, производитель Wenzhou Simple Trading Co., Ltd. (Китай) – <i>подголовник тип 03</i>
	Ткань марки Оксфорд 420D, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – <i>подголовник тип 01; спинка тип 02; сиденье; подушка для спинки тип 01, 02, 03; ремень для голени;</i>
	Ткань сетка неопреновая марки TW11, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – <i>подушка для спинки тип 01; подушка для сиденья тип 02;</i>
10. Кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica, варианты исполнения: Active Life 1000, Active Life 2000, Active Life 3000, Active Life 4000, Active Life 5000, Active Life 6000, Active Life 7000, Active Life 8000, Active Life 9000	Нейлон марки VS-HT100, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – <i>ремень безопасности; ремень для фиксации стоп;</i>
	Алюминий марки 6061T6, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. (Китай) – <i>рама коляски; набор инструментов; боковые щитки; подножка;</i>
	Алюминий марки 6063T5, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. (Китай) – <i>приводной обод заднего колеса;</i>
	Сталь марки STKM11A, производитель Changzhou Hongtai Precision Steel Pipe Co., Ltd. (Китай) – <i>быстросъемная ось заднего колеса; антипрокидыватель;</i>
	ABS пластик марки YU-012, производитель Dongguan Cheng Zhi Plastic Material Limited (Китай) – <i>рычаг стояночного тормоза; опора для стоп; кнопка быстросъемной оси заднего колеса; насос;</i>
	Полиуретан марки CH28R, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd. (Китай) – <i>рукоятка ручки для сопровождающего лица</i>
	Полиуретан марки PU3033, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd. (Китай) – <i>подлокотник;</i>
	Ткань марки Оксфорд 420D, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – <i>подушка для спинки тип 02, 03; подушка для сиденья тип 01; ремень для голени;</i>
	Ткань сетка неопреновая марки TW11, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – <i>подушка для спинки тип 01; подушка для сиденья тип 02, 03;</i>
	Нейлон марки VS-HT100, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd. (Китай) – <i>ремень безопасности; ремень натяжения спинки и сиденья; ремень для фиксации стоп;</i>

9. Подготовка Кресла-коляски к использованию

Перед началом эксплуатации извлеките составные части Кресла-коляски из упаковки и внимательно осмотрите на отсутствие механических повреждений. Убедитесь, что Ваше Кресло-коляска укомплектована, согласно Раздела 7. Затем осуществите монтаж и необходимые регулировки с помощью набора инструментов, который входит в комплектацию коляски.



9.1 Монтаж Кресла-коляски представлен в Таблице 22.

Таблица 22

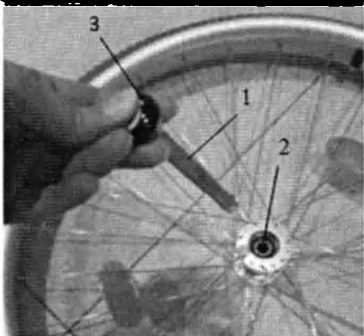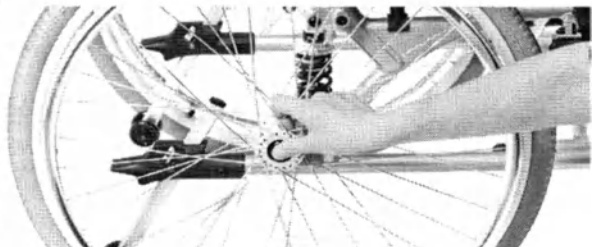Монтаж Кресла-коляски	
1. Установка задних колес тип 01/02/04 (пневматическое/цельнолитое) (для вариантов исполнения: Base 200, 300, 350, 400, 450; Base Lite 350-700; Delux 600-900; Comfort 150-550, Active Life 3000 – 9000) Для установки заднего колеса: нажав на кнопку (3) быстросъемной оси заднего колеса (1) вставьте ее во втулку колеса (2), затем взявшись пальцами за спицы вставьте ось в специальное отверстие на раме до характерного щелчка.	 
2. Раскладывание Кресло-коляски (для: Base 200-350, 500; Base Lite 100-700; Desk 1000; Recline 100-300; Delux 750-900; Home 50; Puma 200-600; Comfort 150-550; Control One 100-600; Active Life 1000-6000) Кресло-коляска складывается и раскладывается без использования инструмента. Нажмите ладонями на трубки сиденья до полного натяжения сиденья.	
3. Раскладывание спинки (для: Base 400, 450, 550-700; Desk 2000-8000; Recline 400-800; Delux 600-700; Home 60-110; Puma 100; Comfort 100) Разложите коляску. Нажмите на фиксаторы (А) с обеих сторон, поднимите спинку до соединения трубок спинки и коляски, отпустите фиксаторы.	 

(для: Comfort 600-700)

Поднимите спинку и закрепите ее, вставив штифт (А) в крепление под сиденьем сзади коляски.

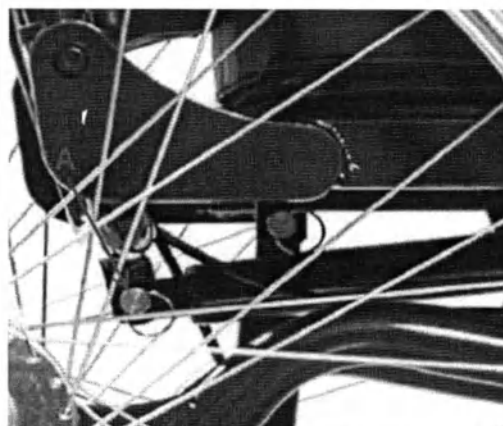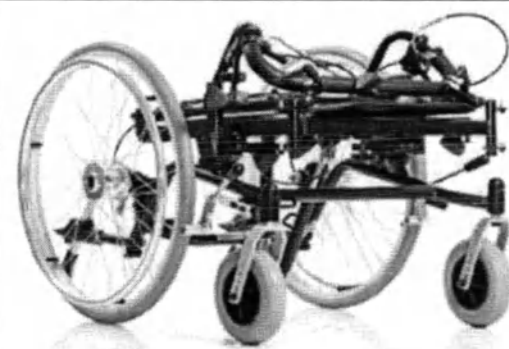

(для: Active Life 7000-9000)

Потяните спинку за рычаг (А) и установите в рабочее положение до щелчка.




4. Установка распорки для жесткости на ручки для сопровождающего лица

(для: Recline 200, 300, 400

Comfort 250, 300, 350, 400)



Закрепите распорку для жесткости (1) на рукоятках для сопровождающего лица (2) с помощью фиксирующих винтов (3)





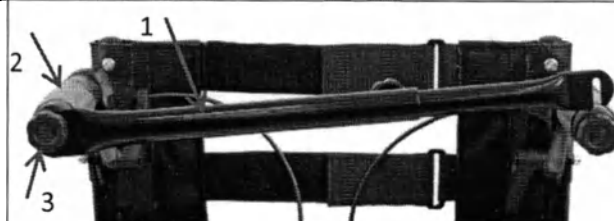


5. Установка спинки тип 01-03

(для вариантов исполнения со съемной спинкой Base Lite 300-400; Control One 300-600; Comfort 150-400; Recline 200, 400)

Вставьте трубки ручек для сопровождающего лица (1) в трубки рамы Кресло-коляски (2) и закрепите в отверстиях фиксатором на необходимой высоте.

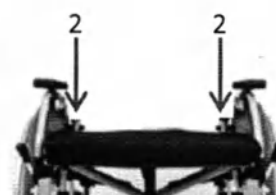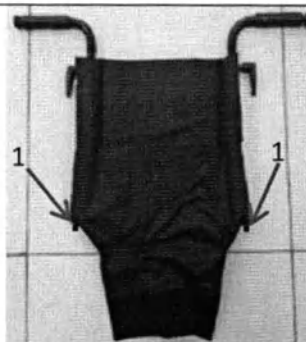

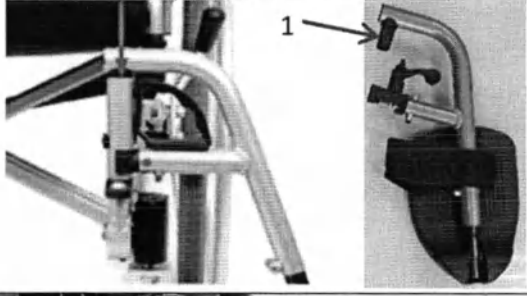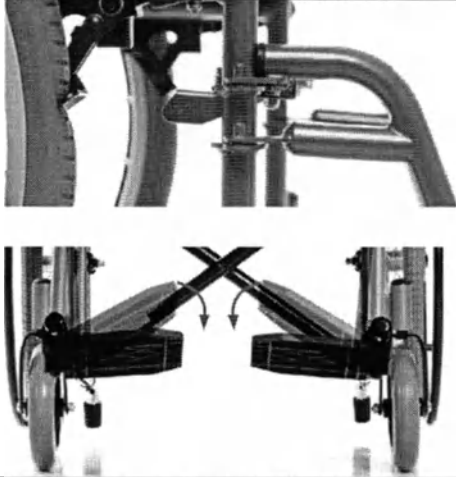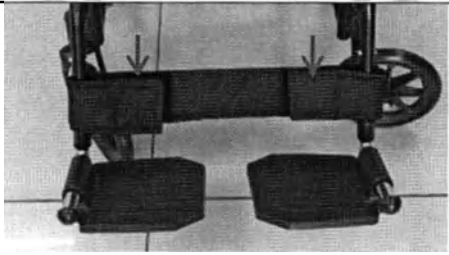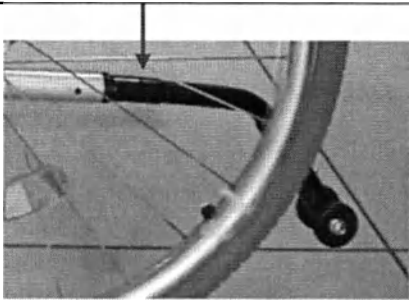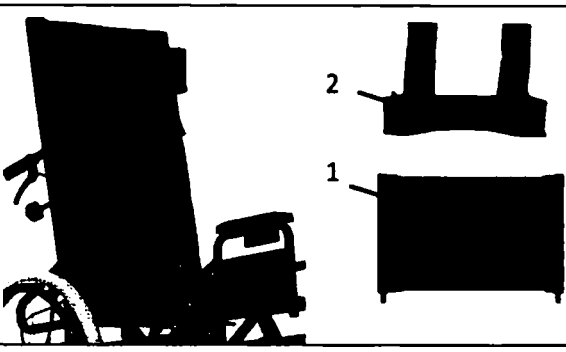6. Установка подножек/подножек, регулируемых по углу наклона тип 03-09 (для: Base Lite 100, 150) Вставьте ось подножки (1) в приемную втулку на раме кресла-коляски и поверните подножку в рабочее положение до щелчка. Откиньте опоры для стоп.	
7. Установка подножек тип 01/02 (для: Base 200,250, 300, 400-700; Home 50-110) Установите подножки в петли на раме и поверните подножку в рабочее положение до щелчка. Откиньте опоры для стоп.	
8. Установка ремня для голени (для: Base 200-300, 400-700; Base Lite 100-350, 450, 550; Recline 200-400; Desk 1000 – 8000; Delux 600 – 850; Home 50-110; Puma 100 – 600; Comfort 200, 450; Control One 100 – 600; Active Life 1000 – 9000) Закрепите на подножках ремень для голени с помощью текстильной застежки (ленты Velcro).	
9. Установка антипрокидывателей (для: Base 400-450; Base Lite 200,300, 350-700; Recline 100-500; Home 80, 90, 100, 110; Comfort 150-550; Control One 100-300, 500-600) Нажмите и удерживайте кнопочный фиксатор антипрокидывателя, затем установите антипрокидыватель в отверстие рамы, отпустите кнопочный фиксатор. Характерный щелчок подтверждает правильность фиксации.	
10. Установка подголовника тип 01 (для Recline 100) Вставьте удлинитель спинки (1) в отверстия рамы спинки, поместите подголовник (2) на необходимую высоту, закрепив его с помощью ленты Velcro на обратной стороне спинки.	

11. Установка подголовника тип 02-04

(для: Comfort 100, 600, 650, 700)



Вставьте подголовник в отверстие держателя на спинке коляски и закрепите необходимую высоту фиксатором.

**12. Установка подголовника тип 03**

(для: Recline 400, 700, 800; Puma 400, 500, 600; Comfort 150-550; Delux 900)


Установите держатель для подголовника на ручках для сопровождающего лица и закрепите с помощью фиксирующего винта (А).

Установите подголовник в отверстие держателя (1) и закрепите необходимое положение фиксатором (2).

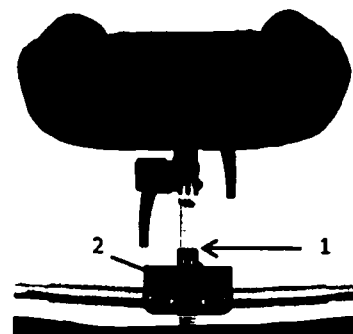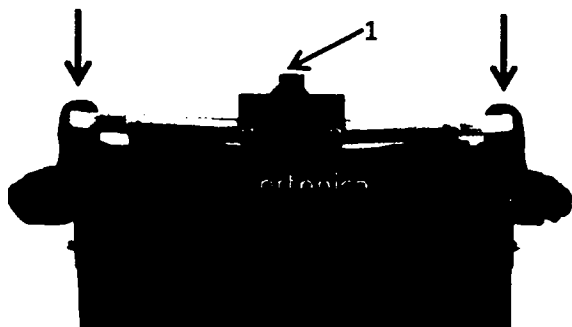**13. Установка подушки для спинки тип 05/06, подушки для сиденья тип 04**


(для Comfort 100, 600-700)

Установите подушку для спинки (1) и подушку для сиденья (2), закрепив их с помощью ленты Velcro соответственно к спинке и к сиденью(3).

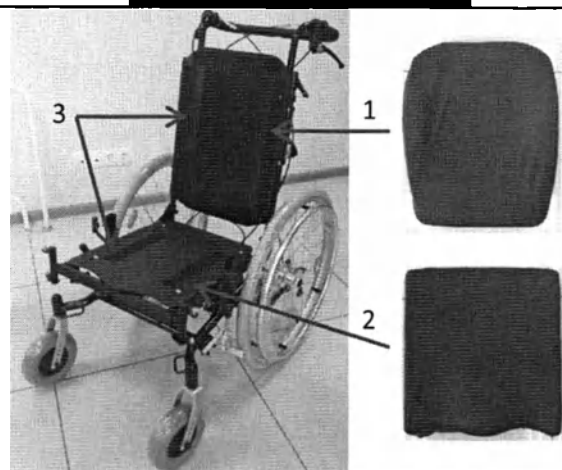


14. Шаг 1. Установка задних колес тип 03 (пневматическое/цельнолитое, с двойным приводом) (для Control One 300-600)

Для установки заднего колеса: нажав на кнопку быстросъемной оси заднего колеса (1) вставьте ее во втулку колеса, затем взявшись пальцами за спицы вставьте ось в специальное отверстие (2) на раме до характерного щелчка.

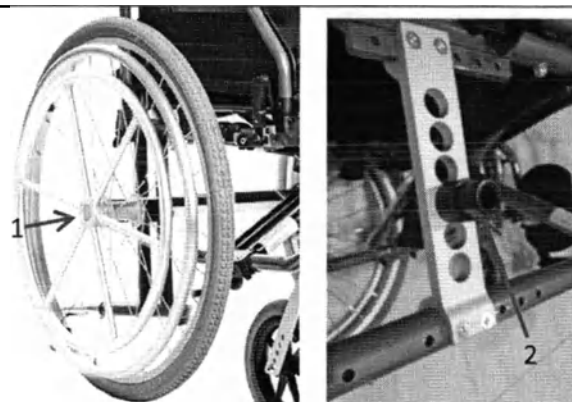


Шаг 2. Установка приводной оси механизма управления одной рукой

Сожмите пружинный механизм приводной оси механизма управления одной рукой (3) и соедините ее с осями правого и левого заднего колеса (2), туго затяните фиксирующий винт (4).

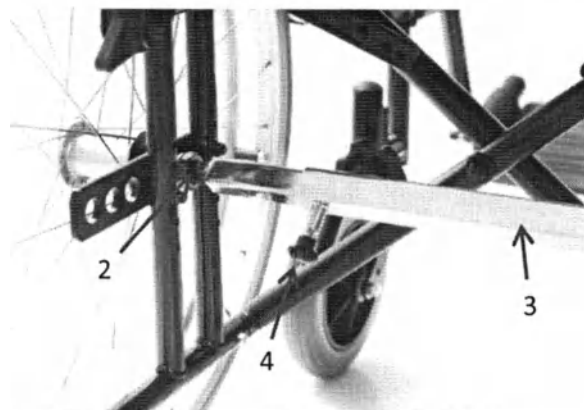


15. Установка переднего колеса тип 01/02 (для Base 400-450)

Нажмите и удерживайте кнопочный фиксатор на держателе переднего колеса (1), вставьте стержень (2) в отверстие держателя до характерного щелчка.

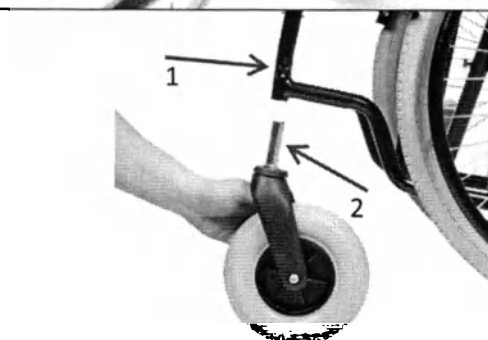


16. Установка подлокотника (для Comfort 600, 650, 700)



Установите подлокотник в отверстие держателя и зафиксируйте его в нужном положении болтовым соединением (А).

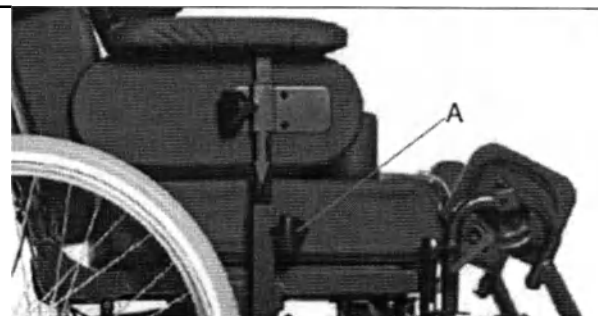

17. Установка боковой поддержки тип 01 (для Comfort 100, 600, 650, 700)


Установите втулку (1) боковой поддержки в держатель на спинке коляски и закрепите фиксатором (2).


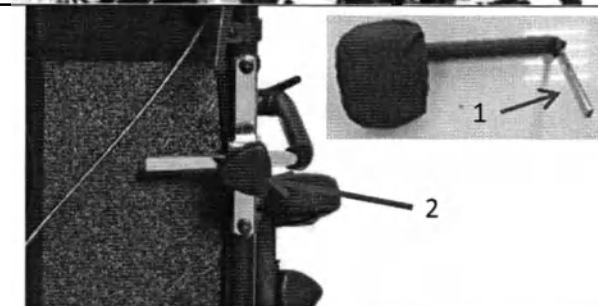


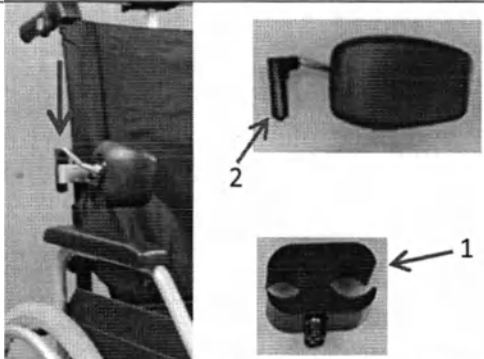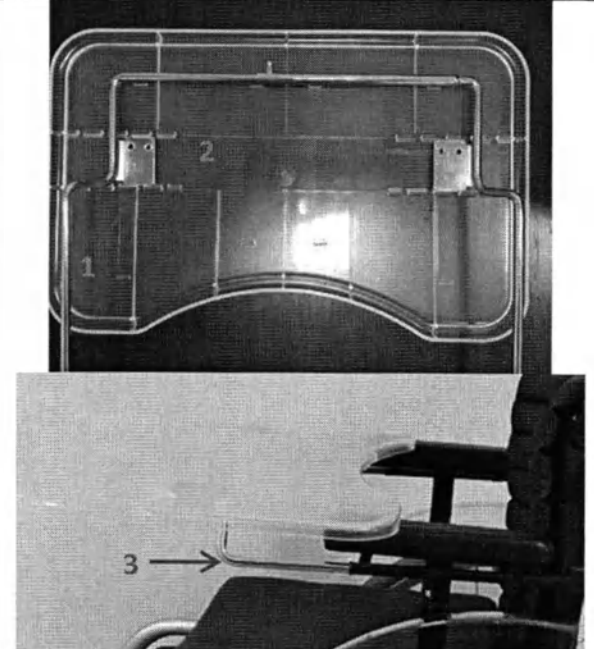18. Установка боковой поддержки тип 02 (для Comfort 100, 600, 650, 700; Puma 600) Установите кронштейн к боковой поддержке (1) на боковую трубку спинки коляски, вставьте втулку (2) боковой поддержки в кронштейн и затяните шести-гранным ключом.	
19. Установка абдуктора (для Comfort 100, 600, 650, 700) Вставьте ножку абдуктора в крепление под сиденьем, закрепите фиксатором на необходимой глубине.	
20. Установка столика (для Puma 300-600) Шаг 1. Вставьте пластины направляющих (1) в крепления под столиком и соедините концы закрепив их болтовым соединением (2). Шаг 2. Вставьте стержни направляющих (3) в отверстия трубок под подлокотником на необходимую глубину.	
21. Проверьте давление в шинах, при необходимости накачайте их насосом	

9.2 Регулировки Кресло-коляски представлены в Таблице 23.


Таблица 23

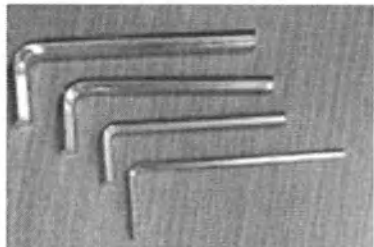Регулировки Кресла-коляски	
После монтажа Кресла-коляски осуществите необходимые регулировки с помощью набора инструментов, который входит в комплектацию Кресла-коляски: - Ключи шестигранные 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм (шестигранник);	

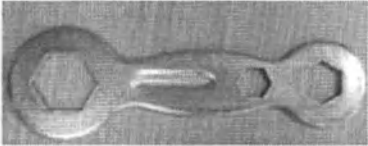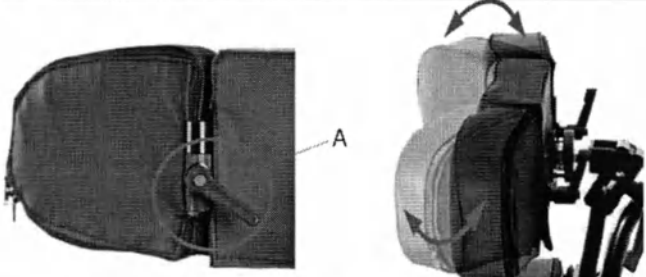- Гаечный ключ на 10 мм, 13 мм, 19 мм	
1. Подголовник, регулировка по высоте (для: Recline 400, 700-800; Delux 900; Puma 400-600; Comfort 100-700) Для того чтобы отрегулировать подголовник по высоте, открутите барашковый болт (А), установите необходимый уровень, после чего туго затяните болт.	
2. Подголовник, регулировка по углу наклона (для: Recline 400, 700, 800; Delux 900; Puma 400, 500, 600; Comfort 100-550) Для того чтобы отрегулировать подголовник по углу наклона, необходимо ослабить фиксаторы (А) на держателе подголовника, установить нужное положение подголовника и затянуть фиксаторы.	
3. Подголовник, регулировка по обхвату головы с помощью фиксатора (для: Comfort 600-700) Для регулировки подголовника по обхвату головы ослабьте фиксаторы (А), установите необходимое положение и затяните фиксаторы.	
4. Спинка, регулировка по высоте с помощью фиксатора (для: Base Lite 300-450; Recline 400; Comfort 150-400; Control One 100-600) Чтобы отрегулировать спинку по высоте, необходимо отстегнуть обшивку, затем ослабить болтовые фиксаторы (А) с обеих сторон коляски, поднять трубки вверх на необходимую высоту, туго затянуть фиксаторы.	
5. Спинка, регулировка по высоте с помощью шестигранника (для Comfort 450-550) Чтобы отрегулировать спинку по высоте, снимите обшивку, полностью открутите болтовые соединения, установите требуемую высоту, закрутите болтовые соединения.	

(для Active Life 3000-9000)


Чтобы отрегулировать спинку по высоте, полностью открутите болтовые соединения (1), удерживающие ткань обшивки спинки. Затем оттяните вниз ткань обшивки пока не будут видны винты регулировки спинки (2). Полностью открутите болтовые соединения. Установите спинку на требуемую высоту. Закрутите болтовые соединения (2), установите обшивку спинки, зафиксируйте ткань болтовыми соединениями (1).

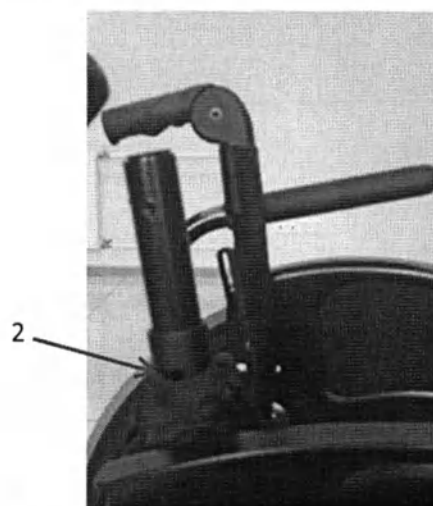

6. Спинка, регулировка по углу наклона с помощью рычага

(для: Base Lite 600-700; Recline 100, 300-800; Delux 850-900; Comfort 100, 300-700; Control One 500,600)


Чтобы отрегулировать спинку по углу наклона нажмите и удерживайте рычаги (A) слева и справа на ручке сопровождающего лица

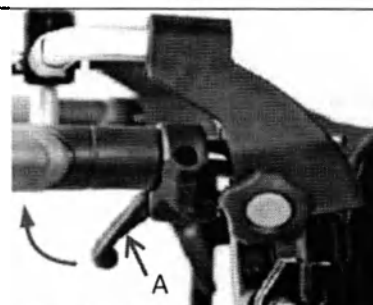

7. Спинка, регулировка по углу наклона с помощью шестигранника

(для: Recline 200; Home 100-110; Puma 200-600; Comfort 200-250; Active Life 3000, 4000, 7000-9000)


Чтобы настроить угол наклона спинки, необходимо с помощью шестигранника и гаечного ключа ослабить болтовое соединение (A), опустить спинку на необходимый уровень симметрично с обеих сторон и туго закрутить болтовые соединения.

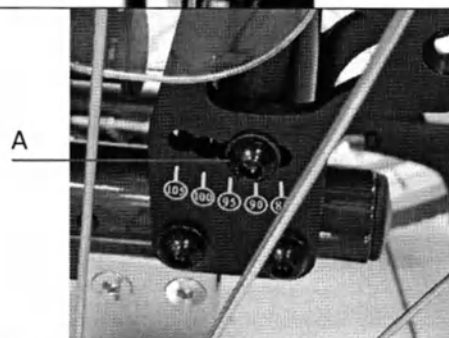

8. Спинка, оперативная регулировка угла наклона с помощью ремня

(для: Recline 100-800; Comfort 100, 300-400, 600-700; Control One 500,600)


Чтобы изменить угол наклона спинки, необходимо потянуть и удерживать ремень фиксатора (A), отпустите ремень фиксатора и зафиксируйте угол наклона спинки.

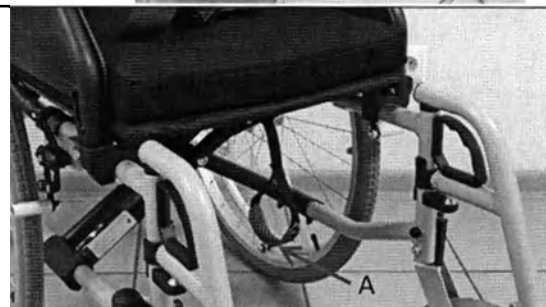

9. Ручки для сопровождающего лица, регулировка по высоте с помощью фиксатора болтового соединения

(для: Base Lite 300-700; Recline 400-800; Puma 200-600; Comfort 100-650; Control One 100-600)


Для регулировки ручек по высоте ослабьте фиксаторы (А) с обеих сторон коляски, переустановите ручки на требуемую высоту, затяните фиксаторы.

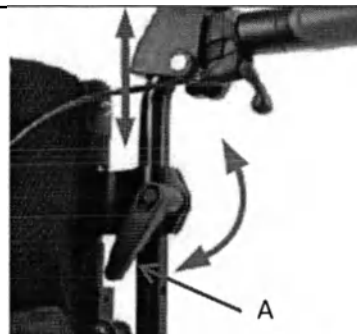

10. Ручки для сопровождающего лица, регулировка по высоте с помощью кнопочного фиксатора

(для: Delux 750-900, Comfort 700)


Для регулировки ручек необходимо нажав на кнопочный фиксатор (А) установить ручку на нужную высоту.

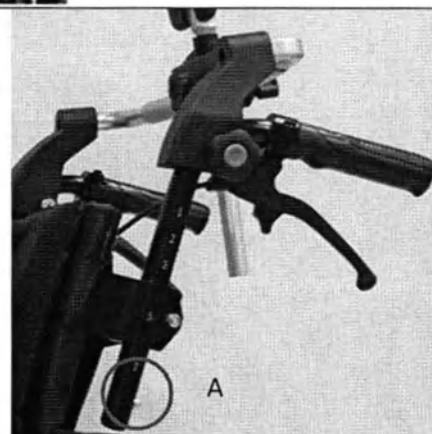

11. Подлокотники, регулировка по высоте с помощью шестигранника и регулировочной пластины

(для: Base 450-650; Base Lite 300-450; Recline 100-400; Home 80; Comfort 150-400; Control One 100, 300, 500, 600)

Чтобы отрегулировать высоту подлокотника открутите регулировочную пластину (А) шестигранником, переместите ее на нужный уровень под подлокотную опору, затем зафиксируйте регулировочную пластину.

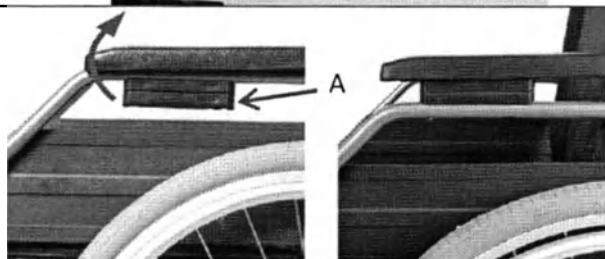

12. Подлокотники, регулировка по высоте с помощью шестигранника


(для Puma 100-600)

Чтобы отрегулировать высоту подлокотника необходимо шестигранным и гаечным ключами открутить ограничитель (А) с обеих сторон, переставить его в нужное положение и закрутить.



(для Active Life 1000, 2000)

Чтобы отрегулировать высоту подлокотника необходимо шестигранным ключом ослабить болтовое соединение (А) установить нужное положение и туго закрутить.

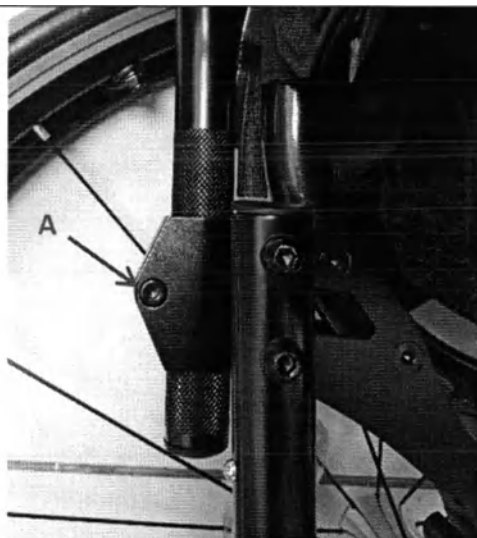

(для Active Life 3000, 4000, 8000, 9000)


Чтобы отрегулировать высоту подлокотника необходимо открутить шестигранным ключом болтовое соединение (А) установить его в нужное положение и закрутить.



13. Подлокотники, регулировка по высоте с помощью кнопочного фиксатора


(для: Base 700; Base Lite 250, 500-700; Desk 1000-8000; Recline 500-800; Delux 650-900; Home 90-110; Comfort 450-550; Control One 200, 400)

Чтобы отрегулировать высоту подлокотника необходимо нажать и удерживать кнопочный фиксатор (А) на подлокотнике с внешней стороны, затем установить на нужную высоту подлокотник, отпустить кнопку, надавить, либо приподнять подлокотник. Характерный щелчок подтверждает фиксацию.

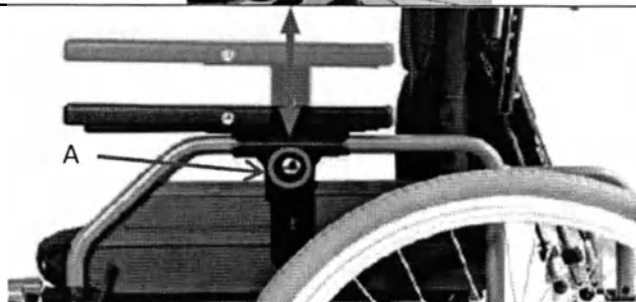

14. Подлокотники, регулировка по высоте с помощью фиксатора болтового соединения (для Comfort 600-700)


Чтобы отрегулировать высоту подлокотника необходимо открутить фиксатор (А), установить на нужную высоту подлокотник, затем туго затянуть фиксатор




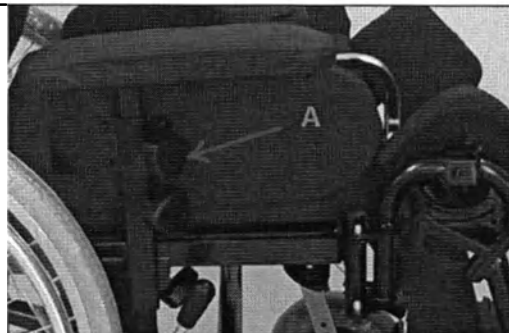


15. Подлокотники, регулировка по глубине с помощью шестигранника и регулировочной пластины


(для: Base 450-650; Base Lite 300-450; Recline 100-400; Home 80; Comfort 150-400; Control One 100, 300, 500, 600;)

Чтобы отрегулировать подлокотники по глубине,

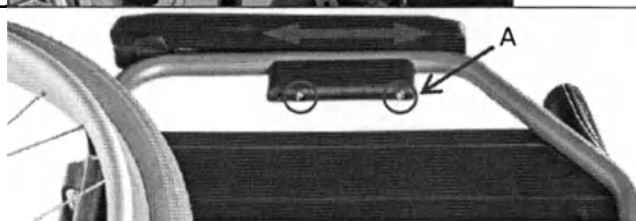

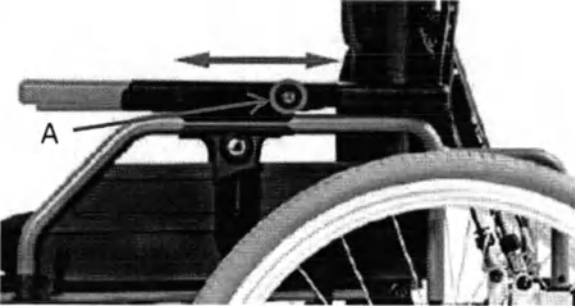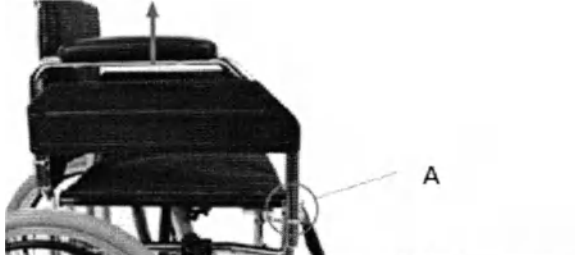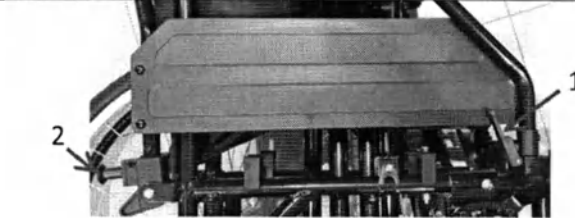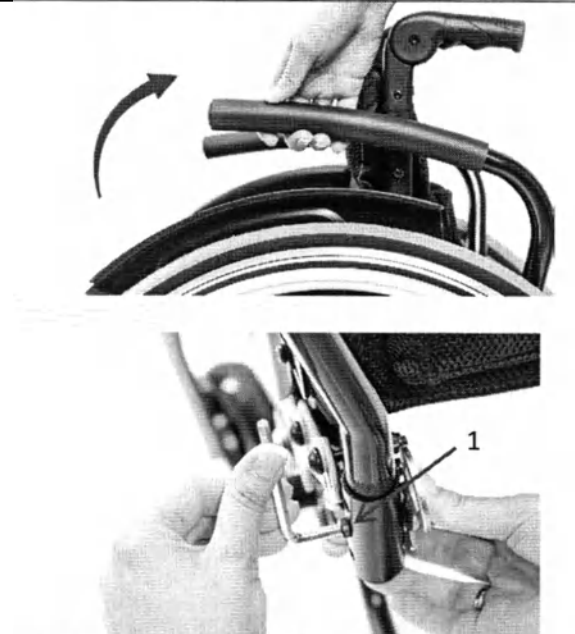
открутите регулировочную пластину (А) шестигранным ключом, переместите подлокотник на нужный уровень, затем зафиксируйте регулировочную пластину.	
16. Подлокотники, регулировка по глубине с помощью кнопочного фиксатора (для: Base 700; Base Lite 250, 500-700; Recline 500-800; Delux 750-900; Home 90-110; Comfort 450-550; Control One 200, 400) Чтобы отрегулировать подлокотники по глубине, необходимо нажать и удерживать кнопочный фиксатор (А). После выбора нужного положения подлокотника отпустите кнопку фиксатора. Характерный щелчок подтверждает фиксацию.	
17. Снять подлокотник (для: Base 200-350; Recline 100; Home 50-60) Чтобы снять подлокотники (для удобства пересаживания) необходимо нажать на кнопочный фиксатор (А) и поднять подлокотник вверх.	
18. Откинуть и снять подлокотник (для: Base 400-450; Base Lite 200-700; Recline 200-800; Delux 600-900; Home 70-110; Comfort 150-550; Control One 100-600) Чтобы снять подлокотник сначала нужно нажать на фиксатор (1) и откинуть подлокотник, затем потянуть за фиксатор (2) и движением вверх снять подлокотник.	
19. Откинуть и снять подлокотник (для: Active Life 1000-4000, 8000, 9000) Чтобы откинуть подлокотник потяните его вверх и назад. Чтобы снять подлокотник открутите болт (1) и движением вверх снимите подлокотник.	
20. Сиденье, регулировка по глубине (для: Base Lite 300-700; Recline 200-800; Puma 200-600; Comfort 100-700; Control One 300-600) Чтобы отрегулировать сиденье по глубине нужно под сиденьем на трубах с двух сторон ослабить фиксатор (1) установить необходи-	

мую глубину и закрепить фиксатор.
При необходимости, если недостаточно места для регулировки нужно изменить положение спинки по горизонтали: открутить болтовые соединения (2) и (3) с помощью шестигранника, изменить положение спинки и подлокотника. Передвинуть оба крепления на необходимый уровень и зафиксировать болтовые соединения.

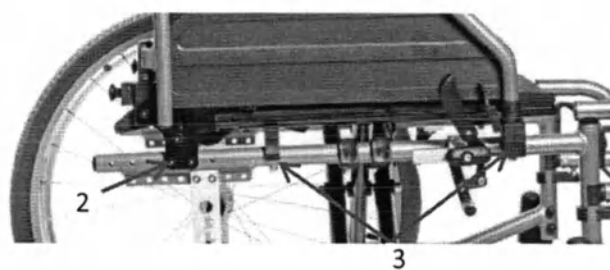


Сиденье, регулировка по глубине
(для Active Life 7000-9000)

Чтобы отрегулировать спинку по глубине, полностью открутите болтовые соединения (1), задайте необходимое положение и закрутите болтовые соединения.

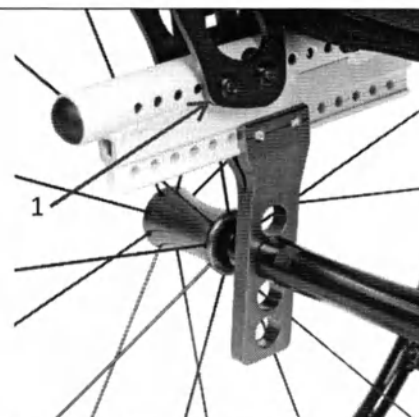


21. Подножки, регулировка по длине с помощью кнопочного фиксатора
(для: Base 100, 300-450; Desk 7000,8000; Recline 100; Home 50,60; Comfort 100,700; Active Life 8000,9000)

Чтобы отрегулировать длину подножки, необходимо нажать и удерживать кнопочный фиксатор (A), установить нужную длину и отпустить кнопочный фиксатор, характерный щелчок подтверждает правильность фиксации.

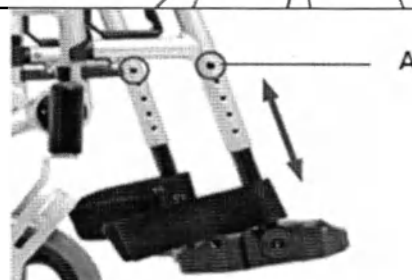

22. Подножки, регулировка по длине с помощью шестигранника
(для: Base 500-700; Base Lite 100,150,300,350,450-550; Desk 1000-6000; Recline 200-400; Delux 600-700; Home 70-110; Puma 100-600; Comfort 200,450; Control One 100-600; Active Life 1000-7000)
Чтобы отрегулировать длину подножки, необходимо шестигранником ослабить соединение (A) с обеих сторон и установить нужную длину, затем затянуть болтовое соединение.

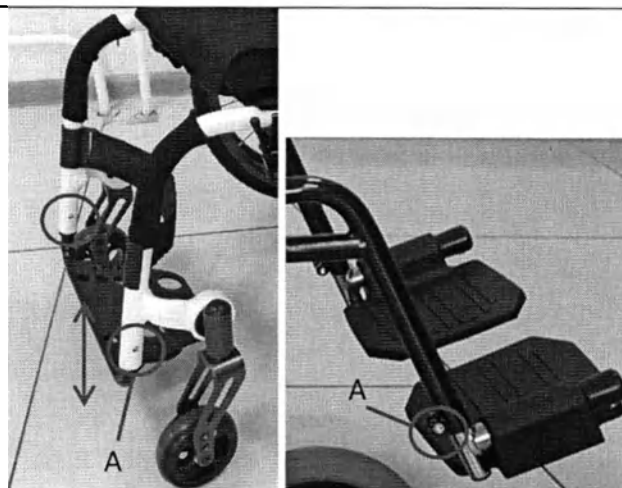

23. Подножки, регулировка по длине с помощью фиксатора

(для: Base Lite 600-650; Recline 500-800; Delux 750-900; Comfort 150,250-400,500-650)

Чтобы отрегулировать длину подножки, необходимо ослабить фиксирующий винт (А), установить подножку на необходимую длину и туго затянуть фиксирующий винт



24. Подножки, регулировка по углу наклона с помощью рычага

(для: Base 350; Base Lite 400,600-700; Comfort 100,150; Recline 100, 500-800; Delux 900)


Для регулирования подножек по углу наклона достаточно установить подножку под требуемым углом. Чтобы вернуть подножку в исходное положение, нажмите рычаг (А) и опустите подножку.



25. Опоры для стоп, регулируемые по углу наклона с помощью шестигранника


(для: Base Lite 300,350,450-700; Desk 6000-8000; Recline 200-800; Delux 600-900; Puma 200-600; Comfort 150-500; Control One 300-600; Active Life 5000,6000)

Чтобы отрегулировать угол наклона опоры для стоп необходимо шестигранным ключом ослабить соединение (А) и установить требуемое положение.

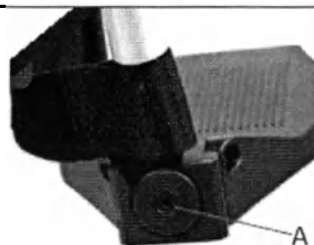

26. Передние колеса, регулировка по вертикали
(для: Base 450-700; Base Lite 300-700; Desk 4000-8000; Recline 200-800; Delux 700-900; Home 50-110; Puma 200-600; Comfort 100-700; Control One 100-600; Active Life 2000-9000)


Чтобы отрегулировать передние колеса по вертикали, открутите винтовое соединение (поз. А) гаечным ключом и установите колесо в нужное отверстие, закрутите винтовое соединение.

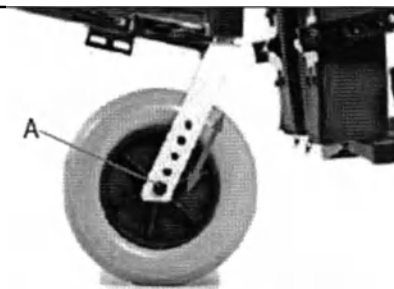

27. Передние колеса, регулировка по горизонтали

(для Active Life 5000-6000)

Чтобы отрегулировать передние колеса по горизонтали, открутите соединения (А) шестигранным ключом, переместите колеса на нужный уровень и туго закрутите соединения.

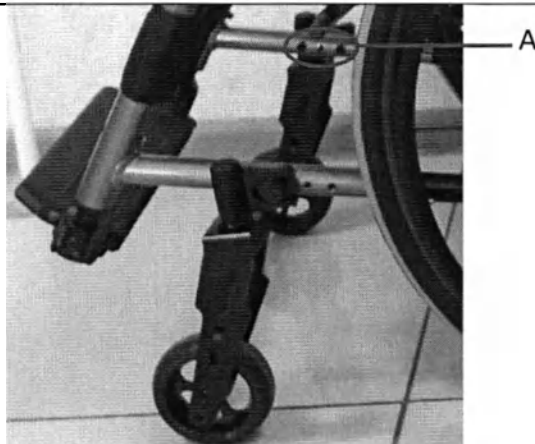


28. Вилка переднего колеса, регулировка по углу наклона
(для Active Life 2000 - 9000)
Чтобы отрегулировать угол наклона, открутите винты (А) используя шестигранник.
Установите нужный наклон вилки колеса, затяните винты.




А

29. Задние колеса, регулировка по вертикали
(для: Base 450-700; Base Lite 300-700; Desk 4000-8000; Recline 200-800; Delux 750-900; Home 90-110; Puma 200-600; Comfort 100-700; Control One 100-600; Active Life 2000-9000)
Чтобы отрегулировать задние колеса по вертикали, необходимо снять заднее колесо, открутить гайки гаечным ключом и вынуть втулку. Затем вставить втулку в нужное отверстие, установить заднее колесо и туго затянуть гайки.

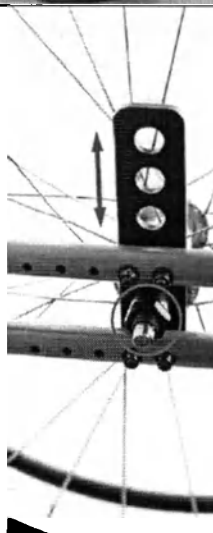

30. Задние колеса, регулировка по горизонтали
(для: Base 450-700; Base Lite 300-700; Recline 200-800; Delux 750-900; Home 90-110; Puma 200-600; Comfort 150-550; Control One 100-600; Active Life 2000-9000)
Чтобы отрегулировать задние колеса по горизонтали, необходимо открутить болтовые соединения гаечным ключом, переместить на нужный уровень заднее колесо и туго закрутить болтовые соединения.

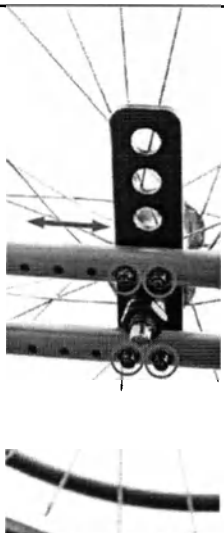

ВНИМАНИЕ! Каждый раз, после регулировки задних колес, проверяйте действие стояночного тормоза.


31. Стояночный тормоз, регулировка по горизонтали
Чтобы отрегулировать стояночный тормоз по горизонтали, необходимо шестигранником ослабить крепления (А), установить в требуемое положение, затянуть крепления.



А

32. Антипрокидыватель, регулировка с помощью кнопочного фиксатора (для: Base Lite 200,250,350-700; Desk 3000-8000; Recline 200-800; Delux 650-900; Puma 200-600; Comfort 100-700; Control One 200-600; Active Life 1000-4000, 9000)

Для регулировки антипрокидывателя по высоте следует нажать и удерживать кнопку фиксатора (А), установить на нужную высоту и отпустить кнопку фиксатора. Характерный щелчок подтверждает правильность фиксации.

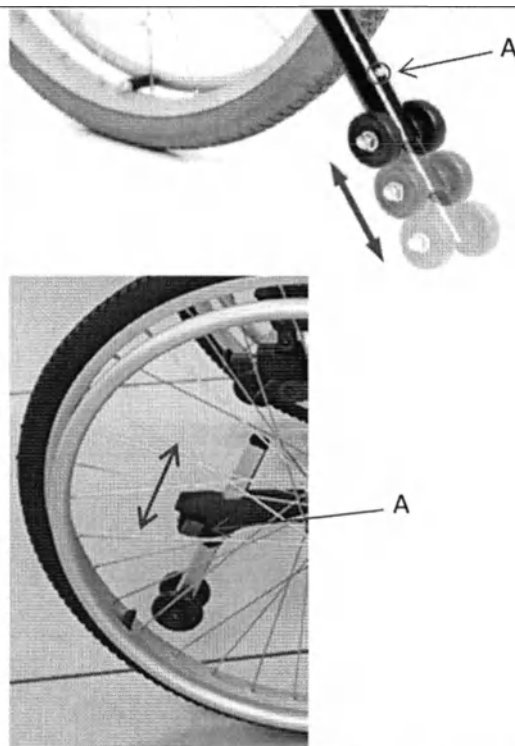

10. Эксплуатация Кресла-коляски

Принцип действия Кресла-коляски состоит в приложении мускульной силы рук пациента к ободу ручного привода на задние колеса или мускульной силы сопровождающего лица к рукоятке Кресла-коляски, приводящей в движение Кресло-коляску с расположенным в ней пациентом. Предназначена для пользования в положении сидя.

10.1 Меры предосторожности при эксплуатации

- Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей коляски.
- Перед посадкой пользователя в Кресло-коляску проверьте надежность закрепления спинки.
- Не превышайте грузоподъемность коляски

- Для посадки в Кресло-коляску спереди необходимо:
 - зафиксировать колеса с помощью стояночных тормозов;
 - сложить вверх опоры для стоп;
 - переместить пользователя в коляску;
 - опустить вниз опоры для стоп и поставить на них ноги;
 - пристегнуть ремень безопасности.
- Высадка осуществляется в обратной последовательности.






ВНИМАНИЕ! Стояночные тормоза не предназначены для торможения в движении!

- Для самостоятельной пересадки из Кресла-коляски без посторонней помощи, Вы должны быть достаточно подвижны и обладать значительной мышечной силой.
 - Расположите коляску, как можно ближе к месту, на которое Вы хотите пересесть, так, чтобы передние колеса смотрели прямо.
 - Поставьте задние колеса на стояночные тормоза.
 - Поднимите подлокотник, находящийся на той стороне, куда Вы планируете пересесть, наверх и откиньте подножки в сто-



роны. - Переместите тело в место, куда хотите пересечь, опершись на противоположный подлокотник.	
• Не наступайте на подножку, во избежание поломки или опрокидывания коляски.	
• Необходимо иметь в виду, что при изменении положения центра тяжести за счет смещения тела пациента или изменении нагрузки на коляску, а также наклоне на угол более 10° повышается опасность опрокидывания коляски.	
• Не тянитесь за чем-либо через спинку коляски – велик риск опрокинуть коляску!	
• Подкатите коляску как можно ближе к объекту так, чтобы можно было его взять просто протянув руку, сохранив при этом нормальное сидячее положение.	
• Прежде чем в одиночку выполнить какое-либо незнакомое действие при использовании коляски, сделайте это под чьим-либо присмотром.	
• Для преодоления лестниц, оборудованных въездными пандусами, воспользуйтесь помощью сопровождающего лица	
• Лестницы, не оборудованные въездными пандусами или подъемниками, должны преодолеваться только с помощью двух помощников, один из которых встает впереди коляски, а другой сзади. Помощник, стоящий позади коляски, наклоняет ее до достижения равновесия, затем подвозит ее к первой ступеньке, крепко ухватив коляску за ручки. Второй помощник, находящийся спереди коляски, крепко держит коляску за передние элементы рамы и приподнимает коляску по ступеням, в то время как первый помощник ставит ногу на следующую ступеньку, повторяя предыдущую операцию. Не опускайте передние колеса до тех пор, пока помощник, стоящий перед коляской, не преодолеет последнюю ступеньку. Чтобы спустить коляску с лестницы: повторите описанные выше операции в обратном порядке.	

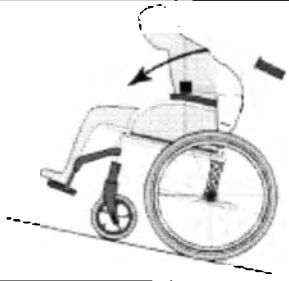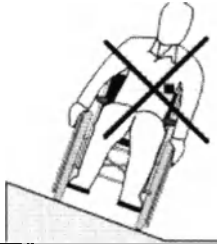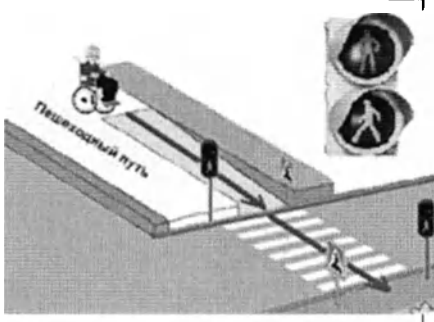• Не превышайте максимальный угол подъема, указанный в паспорте изделия. Более крутые подъемы и спуски создают риск опрокидывания коляски из-за проскальзывания колес или заноса.	
• При подъемах наклоняйтесь вперед для предупреждения опрокидывания.	
• Не пытайтесь пересекать наклонную поверхность по диагонали.	
• При съезде по наклонной поверхности вперед, перенесите центр тяжести назад, наклонившись назад и плотно облокотившись на спинку. Позвольте ободу ручного привода скользить по Вашим ладоням, контролируя при этом скорость и направление движения Кресла-коляски.	
• Запрещается двигать коляску на препятствие (пороги, ступеньки, бордюры и др.) высотой, более указанной в паспорте изделия. Для преодоления препятствий обязательно используйте выездные пандусы и платформы. ВНИМАНИЕ! При движении без торможения в направлении препятствия (бордюр, ступенька и т.д.) имеется опасность выпадения из коляски вперед.	
• Во всех сложных ситуациях при преодолении препятствий необходима помощь сопровождающего.	
• При использовании регулируемого пешеходного перехода Вам необходимо: - подъехать к съезду с тротуара на проезжую часть, оборудованную пешеходным переходом; - поставить коляску на стояночный тормоз; - дождаться разрешающего сигнала светофора; - убедиться в отсутствии транспортных средств на пешеходном переходе, снять коляску со стояночного тормоза и осуществить спуск;	

- не задерживаться и не останавливаться на проезжей части дороги, в том числе на линии горизонтальной дорожной разметки, разделяющей встречные и попутные потоки транспортных средств, за исключением остановки на островках безопасности;
- при приближении к краю проезжей части совершите подъем.

Сопровождающее лицо должно:


- проверить ходовые качества Кресло-коляски;
- проверить, чтобы стопы пользователя устойчиво располагались на подножках, а края одежды и покрывала не попадали в спицы колёс;
- предупреждать пользователя о планируемых действиях, особенно при наклоне коляски;
- не разгонять Кресло-коляску слишком быстро, не изменять резко направление движения;
- не оставлять пользователя без присмотра, даже если Кресло-коляска стоит на тормозе;
- следить, чтобы колени и локти пользователя не задевали дверных проёмов и косяков;
- ни при каких обстоятельствах не отпускать коляску при движении в гору или с неё;
- ни в коем случае не наклонять коляску вперёд;
- чтобы съехать с бордюра, развернуть Кресло-коляску задними колёсами вперёд, спустить её сначала на задних колёсах, затем опустить передние при отсутствии пандуса;
- при преодолении бордюра наклонить коляску к себе, поставить на бордюр передние колёса, затем подтянуть задние при отсутствии пандуса;
- проводить регулярные осмотры коляски;
- при движении по дорогам соблюдать правила дорожного движения.

10.2 Транспортирование Кресла-коляски


Для того чтобы легко транспортировать Кресло-коляску достаточно выполнить ряд простых ручных операций:

Откиньте подножки, снимите их с коляски движением вверх.

ВНИМАНИЕ! При сборке внимательно следите за тем, чтобы вставные оси подножек были надежно зафиксированы в приемных втулках.

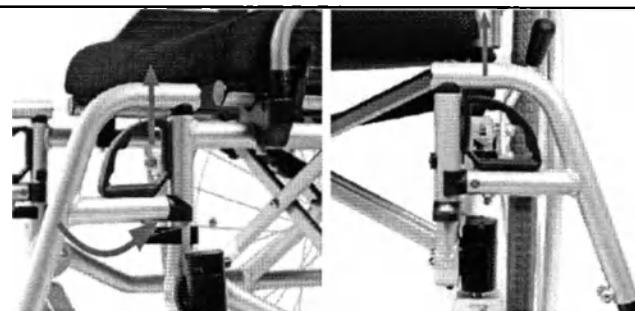


Снимите держатель для подголовника, открутив фиксирующие винты (1), снимите подголовник, открутив барашковый болт (2).

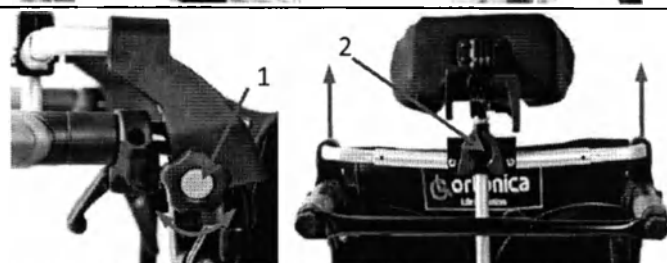

Снимите распорку для жесткости, открутив фиксирующие винты (1)

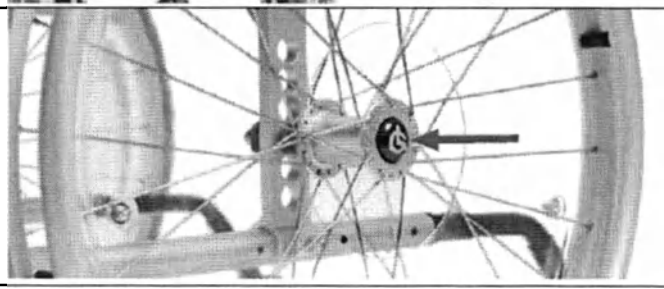

Взявшись за центр сиденья, потяните его вверх, кресло-коляска сложится.	
Снимите задние колеса, нажав на кнопку быстросъемной оси заднего колеса. ВНИМАНИЕ! При сборке внимательно следите за тем, чтобы все фиксаторы защелкивались в соответствующих гнездах.	

11. Ремонт, техническое обслуживание и уход

Для обеспечения правильной и безопасной работы коляски, необходимо обращаться с ней, как с любым другим транспортным средством. Регулярное техническое обслуживание увеличит срок службы и эффективность работы коляски.

Прежде всего, необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации. Оно содержит всю необходимую информацию по уходу за коляской.

Рекомендуем регулярно проходить ежегодное техническое обслуживание в сервисном центре. Обладая определенными навыками, пользователь может сам производить техобслуживание отдельных узлов инвалидной коляски, способствуя их безотказной работе.

Контрольные операции, которые должны выполняться пользователем через указанные интервалы времени.

	Еженедельно	Ежемесячно	Ежегодно
Проверка давления в шинах	✓		
Проверка правильной установки задних колес	✓		
Чистка коляски	✓		
Визуальный контроль		✓	
Проверка винтовых соединений		✓	
Проверка состояния спиц		✓	
Проверка работы стояночных тормозов		✓	
Смазка движущихся частей		✓	
Проверка коляски в сервисном центре			✓

Проверка состояния шин:

- измерьте давление в шинах;
- накачайте шины до требуемого давления;
- проверьте профиль протекторов шин на предмет износа;
- при необходимости, замените шины.

ВАЖНО!

Не допускайте езды на спущенных шинах, это может привести к повреждению элементов коляски и травмированию пользователя.

Проверка правильной установки задних колес:

- потяните за заднее колесо, чтобы проверить надежность фиксации полуоси. Колесо не должно сниматься;
- если задние колеса не фиксируются, удалите имеющиеся загрязнения и налет. Если это не устранило проблему, проведите повторную регулировку полуосей в сервисном центре.

Визуальный контроль:

- осмотрите коляску и проверьте ее на наличие незакрепленных деталей, трещин и прочих неполадок;
- обнаружив неполадку, немедленно обратитесь в сервисный центр для ее устранения.

Чистка коляски:

- очищайте покрышки и пластиковые детали коляски неагрессивным чистящим средством;
- сначала очистите грязные детали влажной губкой, затем используйте чистящие средства на водной основе, не содержащие силикон. Допускается протирание поверхностей 1 % раствором монохлорамина ХБ;
- необходимо снимать передние колеса и очищать их от грязи и волос.

ВАЖНО!

Не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства, например, растворители, а также твёрдые щётки и т.д., это может поцарапать коляску.

Проверка винтовых соединений:

Длительная эксплуатация коляски может привести к ослаблению резьбовых соединений.

- проверьте затяжку винтов;
- подтяните ослабевшие резьбовые соединения.

ВАЖНО!

Гайки и винты утрачивают после неоднократного ослабления и подтягивания свои свойства. Проводите замену гаек и винтов.

Проверка натяжения спиц:

- спицы не должны быть ослабленными или деформированными;
- проведите в сервисном центре подтяжку ослабевших спиц;
- проведите в сервисном центре замену сломанных спиц.

Проверка стояночных тормозов:

- проверьте состояние стояночных тормозов;
- тормоз отрегулирован правильно, если тормозная колодка при нажатом тормозе вдавливаются в шину на несколько миллиметров;
- обнаружив, что тормоза коляски неправильно отрегулированы, проведите в сервисном центре надлежащую регулировку.

ВАЖНО!

После замены или изменения положения задних колес необходимо провести повторную регулировку стояночных тормозов.

Смазка движущихся частей

- движущиеся части в том числе механизм складывания, слегка смазывайте машинным маслом.

Проверка коляски в сервисном центре:

- регулярный осмотр коляски, устранение элементарных неполадок и плановая техническая проверка в специализированном сервисном центре продлят ее срок службы и сведут к минимуму ремонтные случаи.

Шиномонтаж

На случай аварийной ситуации рекомендуем иметь с собой рем комплект и насос. Причины, по которым шина может спускать: прокол в камере, проблема с ниппелем. Если шина спускает по причине прокола камеры, следует действовать по следующему алгоритму:

1. Запомните положение покрышки относительно обода колеса (выполнение этого пункта облегчит поиск предмета, который послужил причиной прокола).
2. Снимите с колеса шину с камерой, аккуратно поддевая ее за край гаечным ключом или пластмассовой дощечкой. Не рекомендуется использовать острые предметы, поскольку можно повредить камеру.
3. Накачайте в камеру воздух, чтобы найти место прокола. Дополнительно можно воспользоваться мыльным раствором или емкостью с водой.
4. Зачистите место прокола.
5. Приклейте заплатку и сильно прижмите.
6. Найдите причину прокола на шине (для облегчения поиска наложите камеру на шину и место заплатки покажет место прокола). Устраните причину прокола.
7. Немного накачайте камеру, расправив складки, и установите камеру обратно, начав за ниппелем.
8. Проверьте, чтобы камера не имела складок.
9. Проверьте отсутствие защемления камеры и правильную установку ниппеля.
10. Накачайте камеру до степени, при которой ее можно сдавить пальцами. Проверьте расстояние по обе стороны покрышки и по всей окружности, оно должно быть одинаковым. Накачайте камеру до рабочего давления и плотно заверните колпачок.

Сервисное обслуживание

Ремонт и сервисное обслуживание коляски могут выполняться исключительно в сервисном центре компании представителя производителя A & I INDUSTRIES LTD SHUNDE FOSHAN. Получить информацию о проведении ремонтных работ и обслуживании коляски, а также узнать стоимость и возможность приобретения запасных частей, можно в сервисном центре компании.

В случае поломки коляски необходимо предоставлять в сервисный центр компании изделие целиком, т.е. в собранном виде, для дальнейшего ремонта.

Контакты сервисного центра: Адрес: 394026 , г. Воронеж, Московский пр-т, д. 11

Телефон: 8 (499) 110 29 80

12. Возможные неисправности и способы их устранения

Во время эксплуатации Кресла-коляски могут возникнуть некоторые неисправности. Пожалуйста, обратитесь к Таблице 24. В случае более серьезных неисправностей необходимо обратиться в сервисный центр компании представителя производителя Ortonica.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Стояночные тормоза не удерживают кресло-коляску в устойчивом положении	Стояночный тормоз отрегулирован неправильно	Отрегулируйте стояночный тормоз по горизонтали как указано в таблице 23.
Кресло-коляска не останавливается при нажатии на рукоятку тормоза для сопровождающего лица	Тормозная система неисправна	Обратитесь в сервисный центр
Спущена шина	Прокол шины, износ	Подкачать, заклеить отверстие или заменить.

13. Упаковка

Упаковка Кресла-коляски имеет следующую конфигурацию:

1. Эксплуатационные и товаросопроводительные документы вложены в пакет из полиэтиленовой пленки и помещены в транспортную упаковку;
2. Составляющие части Кресла-коляски упакованы в пакет из полиэтиленовой пленки и вложены в транспортную упаковку;
3. Для транспортировки Кресло-коляска уложена в транспортную упаковку (короб из гофрированного картона), исключающего повреждение изделия. Короб из гофрированного картона соответствует чертежам предприятия-изготовителя, в зависимости от габаритных размеров Кресла-коляски в сложенном виде.

14. Информация о маркировке изделия

14.1 Маркировка на транспортной упаковке включает в себя:

- Наименование варианта исполнения;
- Тип шин (пневматические/цельнолитые);
- Исполнение крестообразной конструкции рамы;
- Цвет рамы;
- Наличие механизма управления одной рукой;
- Наличие подголовника;
- Наличие регулировки по углу наклона спинки;
- Наличие подушки для сиденья;
- Наличие регулировки подлокотника по высоте;
- Штрих-код (идентификация изделия);
- Наличие регулировки подножек;
- Наличие антипрокидывателей;
- Наличие функции складывания спинки;
- Серийный номер.

14.2 Маркировка на Кресло-коляске включает в себя:

- Логотип компании;
- Наименование варианта исполнения Кресла-коляски;
- Максимальную грузоподъемность;
- Ширину сиденья;

- Дату изготовления;
- Серийный номер;
- Номер регистрационного удостоверения, дату выдачи;
- Наименование и адрес Производителя;
- Наименование и адрес Уполномоченного представителя в РФ;
- Предупреждающий знак «Опасность защемления».

14.3 Маркировка на пневматической шине заднего колеса:

«37-540» - ширина обода колеса 37 мм, внешний диаметр обода колеса 540 мм;
 «(24x1³/₈)» диаметр шины 24 дюйма - 610 мм, ширина шины 1³/₈ дюйма - 35 мм;
 «MADE IN CHINA» - сделано в Китае;
 «INFLATE TO 65 PSI.» - надувать до 65 PSI (4,5 бар);
 «(450 kPa) – 4,5 BAR» - рекомендуемое давление в шинах 4,5 бар;
 «NYLON» - корд шины усилен нейлоновыми нитями.

14.4 Маркировка на цельнолитой шине заднего колеса:

«(24x13/8)» диаметр шины 24 дюйма - 610 мм, ширина шины 13/8 дюйма - 35 мм;
 «MADE IN CHINA» - сделано в Китае.

14.5 Расшифровка символов, применяемых при маркировке:

Символ	Расшифровка символа
	Указывает на ситуацию, которая может быть серьезной, умеренной или незначительной
	Беречь от влаги
	Верх (указывает правильное вертикальное положение)

15. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования

Упакованные Кресла-коляски транспортируют при температуре от минус 50°C до +50°C, относительной влажности до 100% при температуре +25°C.

Кресла-коляски транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта коляску допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Кресло-коляска хранится в крытых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50°C до +40°C, относительной влажности до 98% при температуре +25°C.

Кресло-коляска работоспособна в процессе кратковременной эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 40°C (длительной минус 25°C) до +40°C и относительной влажности до 100% при температуре +25°C.

16. Утилизация

По истечении срока службы или списания в результате выхода из строя Кресло-коляска подлежит утилизации.

Утилизация Кресло-коляски допускается вместе с бытовыми отходами, в соответствии с СанПин 2.1.3684-21, для отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы).

17. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества коляски требованиям, установленным в выписке из технической документации или руководстве по эксплуатации, при соблюдении условий упаковки, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения – 2 года.

Гарантийный срок эксплуатации с момента поставки или продажи – 1 год.

Гарантия распространяется на производственные дефекты. В течение всего срока действия гарантии все узлы Кресла-коляски, имеющие дефекты обработки или материала, заменяются или ремонтируются сервисным центром бесплатно. Гарантия предполагает ремонт или обмен изделия.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные эксплуатацией изделия в условиях, не соответствующих условиям эксплуатации, установленным в выписке из технической документации или руководстве по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные внешними воздействиями (физическими или химическими) вследствие использования Кресла-коляски не по назначению, установленному в выписке из технической документации или руководстве по эксплуатации, а также применения химических веществ, не соответствующих или эквивалентных химическим веществам, допустимым к применению средств в выписке из технической документации или руководстве по эксплуатации.

Срок службы Кресла-коляски 6 лет.

За критерий предельного состояния принимают невозможность или технико-экономическую нецелесообразность восстановления Кресла-коляски путем ремонта.

18. Применяемые стандарты

№	Наименование
EN ISO 10993-1:2020	Оценка биологического действия медицинских изделий – Часть 1: Оценка и исследования
ISO 7176-1:2014	Кресла-коляски - Часть 1: Определение статической устойчивости
ISO 7176-3:2012	Кресла-коляски - Часть 3: Определение эффективности действия тормозной системы
ISO 7176-5:2008	Кресла-коляски - Часть 5: Определение размеров, массы и площади для маневрирования
ISO 7176-7:1998	Кресла-коляски - Часть 7: Измерение размеров сиденья и колеса
ISO 7176-8:2014	Кресла-коляски - Часть 8: Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность
ISO 7176-11:2012	Кресла-коляски - Часть 11: Испытательные манекены
ISO 7176-13:1989	Кресла-коляски - Часть 13: Определение коэффициента трения поверхностей для испытаний
ISO 7176-15:1996	Кресла-коляски - Часть 15: Требования к информационному описанию,

	документированию и маркировке
ISO 7176-16:2012	Кресла-коляски - Часть 16: Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела
QB/T 1802-2017	Циклы. Обод
QB/T 1888-1993	Спицы и ниппели
GB/T 1702-2017	Пневматические шины
GB/T 18029.26-2014	Кресла-коляски. Часть 26. Словарь
GB/T 10824-2008	Техническая спецификация твердых покрышек для пневматических шин, ободьев
GB/T 13800-2009	Механические кресла-коляски
ISO 15223-1:2016	Медицинские изделия - Символы, используемые на этикетках медицинских изделий, при маркировке и в предоставляемой информации - Часть 1: Общие требования

19. Рекламации

По вопросам эксплуатации медицинского изделия, нежелательных явлениях, выявленных при использовании Кресла-коляски, можно обращаться к уполномоченному представителю производителя на территории РФ по адресу:

ООО «Ортоника»

Адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 2, кв. 14

Телефон: +7 (495) 648-60-42

e-mail: info@ortonica.ru

[Перевод с английского и китайского языков на русский язык]

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Нотариальное бюро Шуньдэ, город Фошань, провинция Гуандун,
Китайская Народная Республика

**«А Энд Ай Индастриз Лтд Шуньдэ Фошань»
(A & I Industries Ltd Shunde Foshan)**

Адрес: Промышленный парк Лианду, городской округ Лэ Лю, район Шуньдэ, город
Фошань, Китай (Liandu Industrial Park, Le Liu Town, Shunde District, Foshan City, China)
Тел.: +86-757-23662005 Факс: +86-757-25631224

«УТВЕРЖДАЮ»
«А Энд Ай Индастриз Лтд Шуньдэ Фошань»,
Промышленный парк Лианду, городской округ Лэ Лю,
район Шуньдэ, город Фошань, Китай
Директор
Хуанг Вэйчэнь (Huang Weichen)

/подпись/

04.08.2021 г.

[Печать: Компания «А Энд Ай Индастриз Лтд Шуньдэ Фошань»]

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
Кресло-коляска инвалидная Ortonica

[Текст документа на английском и китайском языках идентичен]

[Печать: Нотариальное бюро Шуньдэ, г. Фошань, провинция Гуандун 4406064203115]

IV45214438

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

(2021) YFSD № 9294

Заявитель: компания «А Энд Ай Индастриз Лтд Шуньдэ Фошань»

Адрес: Промышленный парк Лианду, городской округ Лэ Лю, район Шуньдэ, город Фошань, Китай.

Единый код социальной ответственности: 914406066176528775

Законный представитель: Хуанг Вэйчэнь, муж., дата рождения: 28 сентября 1972 года, Разрешение на въезд на материк для жителей Тайваня № 01653781.

Предмет заверения: подпись, печать.

Настоящим удостоверяется, что Хуанг Вэйчэнь, являющийся законным представителем компании «А Энд Ай Индастриз Лтд Шуньдэ Фошань, пришел в наш офис 8 апреля 2021 г., поставил свою подпись и печать компании на вышеуказанном документе на иностранном языке в присутствии меня, государственного нотариуса.

Нотариус: Ву Даньдань (Wu Dandan)
Государственная нотариальная контора
Шуньдэ, г. Фошань, провинция Гуандун
Китайская Народная Республика
13 апреля 2021 г.

IV45258286

[Печать: Нотариальное бюро Шуньдэ, г. Фошань, провинция Гуандун 4406064203115]

IV45214439

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

(2021) YFSD № 9295

Заявитель: компания «А Энд Ай Индастриз Лтд Шуньдэ Фошань»

Адрес: Промышленный парк Лианду, городской округ Лэ Лю, район Шуньдэ, город Фошань, Китай.

Единый код социальной ответственности: 914406066176528775

Законный представитель: Хуанг Вэйчэнь, муж., дата рождения: 28 сентября 1972 года,

Разрешение на въезд на материк для жителей Тайваня № 01653781.

Предмет заверения: перевод соответствует оригинальному документу.

Настоящим удостоверяется, что приведенный выше перевод на английский язык соответствует оригиналу документа на китайском языке.

Нотариус: Ву Даньдань

Государственная нотариальная контора

Шуньдэ, г. Фошань, провинция Гуандун

Китайская Народная Республика

13 апреля 2021 г.

IV45258288

[Текст на русском языке]

Перевод данного текста выполнен переводчиком Сироткиной Марией Олеговной

Сироткина

Российская Федерация

Город Москва

Седьмого июня две тысячи двадцать первого года


Я, Ребрина Елена Дмитриевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Сироткиной Марии Олеговны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09 – н/77 – 2021 – *37-2495*

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

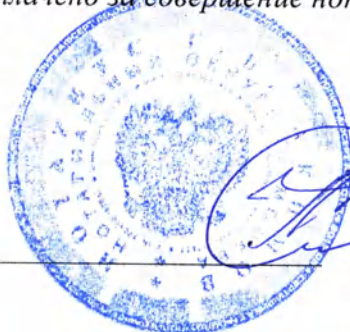

Е.Д. Ребрина



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью *129* лист(-а-ов).

ВРИО нотариуса:

129