

Инструкция по использованию жгута кровоостанавливающего венозного "Meridian"

Предназначен для ограничения
циркуляции крови в конечностях
тела.

Применение:

1. Обернуть жгут вокруг конечности,
не допуская перекручивания ленты,
вставить защелку в корпус.
2. Потянуть за свободный конец
жгута для ограничения циркуляции
крови.
3. Для снятия жгута нажать на
кнопку и освободить защелку.

- Изготовлен из мягкой прорезинен-
ной ленты, с пластмассовой
застежкой.
- Стерильный.
- Хранить при температуре от
-30 до +45 °C.
- Срок годности - 5 лет с даты
изготовления, указанной на
упаковке.


MERIDIAN®

ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ВЕНОЗНЫЙ BLOOD STOPPING BANDAGE

Производитель:
DSM Фарма-Аппарате Хандель АГ
Баарштрассе 8, Цуг, Швейцария
Продавец:
ООО "ДГМ Фарма-Аппарате РУС"
121614 Москва, ул. Крылатские Холмы,
д.30, корп.9, тел.: (495) 739-39-49

РУ ФС № 2005/1526 от 19.10.2005

Made in China

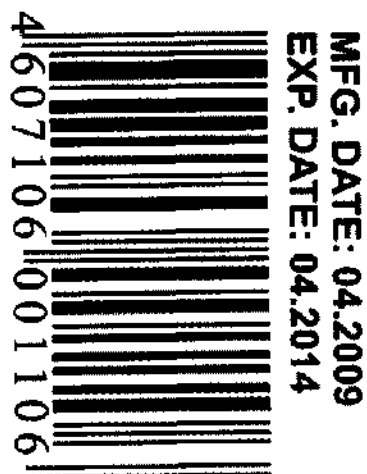

MFG. DATE: 04.2009
EXP. DATE: 04.2014