

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора
от _____ 200__ г. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

«Международная
торговая компания МК»

Го Сяннань

_____ 200__ г.



ИНСТРУКЦИЯ

По применению Устройств инфузионных одноразового использования (с иглой).

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства инфузионные одноразового использования (с иглой) предназначены для внутривенного вливания инфузионных растворов из стеклянных и полимерных емкостей.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

а. Составные части устройства:

- игла к ёмкости (с боковыми отверстиями) с колпачком, с каналами для прохода воздуха и жидкости,
- капельница полужесткая,
- узел фильтрующий,
- трубка,
- роликовый зажим,
- узел инъекционный,
- головка с конусом « Луер »,
- игла инъекционная с колпачком,
- головка с заглушкой и фильтром,

б. Устройства поставляются стерильными в герметичной упаковке, с указанием срока годности, краткой инструкцией по применению и мерах безопасности.

с. Устройства с иглой являются одноразовыми изделиями.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Данные изделия не годны для гемотрансфузии или не годны при указании запрещения применения аппаратуры и инструментов инфузии из полиолефинового пластика на инструкции кровяного состава и лекарства.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

а. Снять предохранительный колпачок конусного наконечника, подсоединить с инъекционной иглой или иглой инфузии;

б. Снять предохранительный колпачок пробойника, подсоединить пробойник с необходимой ёмкостью для инфузии;

в. открыть регулятор расхода, слить жидкие лекарственные препараты из ёмкости для инфузии в полость трубочки блока инфузии;

г. Сохранять 2/3 жидких лекарственных препаратов в капельной воронке. Полностью выпустить воздух из трубочки, закрыть регулятор расхода;

д. Проводить стерилизацию кожи и прокалывание вены по требованиям внутривенной

инъекции:

- е. Увидев кровь в трубопроводе иглы инфузии, сразу открыть регулятор расхода;
- ё. Фиксируя иглу инфузии и регулируя капельную скорость, проводить внутривенную капельницу;
- ж. При добавлении лекарства, отсасывать необходимое лекарство шприцем, инъектировать лекарство в шприце в капельную воронку после стерилизации йодом инъекционного узла над капельной воронкой;

5.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- а. Данные изделия применяются только для инфузии под действием силы тяжести,
 - б. Применение блока с оторванным предохранительным колпачком и повреждением индивидуальной упаковки запрещается,
 - в. Настоящее изделие принадлежит однократному применению и ликвидации после его применения.
 - г. Не годны для гемотрансфузии или при указании запрещения применения аппаратуры и инструментов инфузии из полиолефинового пластика на инструкции кровяного состава и лекарства.
 - д. Каждые 20 капель дистиллированной воды капающей из капельницы для данного изделия составляют $1\text{ml} \pm 0.1\text{ml}$.
- Применение просроченного блока запрещается.
- Хранить в сухом помещении с вентиляцией, при комнатной температуре, защищенном от солнечного света месте.
- Срок годности: 2года

Генеральный директор
ООО «Международная торговая компания МК»



Го Сянэнь