




СИМЕС-2

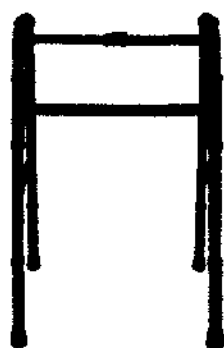

Руководство по эксплуатации

Опоры-ходунки

Опоры-ходунки (далее опоры) предназначены для облегчения ходьбы, поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в домашних условиях и на улице, управляются обеими руками, возможно в комбинации с верхней частью тела, облегчают уход за тяжелобольными и инвалидами.

Варианты исполнения опор указаны в таблице 1

Таблица 1

Наименование	Регулировка по высоте, см	Масса пользователя, кг	Ширина, см	Длина, см
10180(высота 66-81см; высота 80-95 см)	66-81	135	46	50
	80-95		46	50
10180-3W	81-93	135	46	50
10180-W	81-93	135	46	50
10181	81-91	135	46	50
10184HR	83-93	135	51	49
10184	71-88	135	46	45
10185(высота 47-64см; высота 59-78 см)	47-64	63	35	71
	59-78		40	78
10185-BA	79-96	225	45	50
10188(высота 65-82см; высота 81-91 см)	65-82	135	46	44
	82-94			
10189	81-91	135	46	44
RollDuo	80-98	100	53	62



RollTrio	80-95	115	58	69
RollQuattro	80-99	115	58	68
RollPush	82-94	114	50	50
RollEuro	82-89	114	60	48
Quick	80-89	114	59	68
Smart	82-94	116	58	68

Опоры выполнены из алюминиевых труб с анодированным или порошковым покрытием, регулируемые опоры, с мягкими рукоятками и резиновыми наконечниками.

Опоры моделей 10180-10181 и 10184-10185-BA, 10188-10189 используют просто переставляя конструкцию перед собой. К данным моделям можно отдельно приобрести различные виды колес (10177, 10178). Колеса вставляются в две передние опоры. При передвижении отрываются от пола задние опоры, с помощью колес ходунков перекачивается на удобное расстояние и опускается на задние опоры. В модели 10184HR комбинированная конструкция, совмещающая обычные ходунки и устройство для облегчения вставания. В моделях 10180-W, 10180-3W и RollDuo на передних опорах 2 колеса. RollTrio-3 колеса, RollQuattro, RollPush, RollEuro, Quick, Smart, 10185 (высота 47-64 см; высота 59-78 см)-4 колеса.

Рукоятки опор изготовлены из не абсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и имеют такую форму, которая обеспечивает прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки.

Опоры имеют наконечники такой конструкции, которая обеспечивает надежное удержание на опорах и изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения.

Конструкция наконечников ходунков обеспечивает легкость их замены (при необходимости) и не создает эффекта присоски с поверхностью, по которой происходит движение.

По заказу, дополнительно опоры могут комплектоваться следующими принадлежностями, ассортимент которых приведен в таблице 2

Таблица 2

Комплекующие	
Артикул	Назначение
10020	Резиновая насадка на ходунки
10038	Резиновая насадка на ходунки
10173	Колеса к ходункам
10174	Колеса к ходункам
10175	Колеса к ходункам
10176	Колеса к ходункам
10177	Колеса к ходункам
10178	Колеса к ходункам поворотные
10179	Дополнительная опора к опорам моделей (10184,10185)

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Установка высоты происходит через алюминиевую трубку путем нажатия на клип-фиксатор нажимную кнопку

Установка высоты опоры

- Нажимную кнопку вдавить в отверстие или вынуть клип-фиксатор .
- Алюминиевую трубку поставить в желаемое положение.
- Нажать кнопку и защелкнуть клип-фиксатор.

Замена резинового наконечника

Использованный или поврежденный резиновый наконечник нужно обязательно заменить (Е). Снимите его с конца трубки, прикрепите новый, учитывая его размер и конструкцию (см. технические характеристики), убедитесь в том, что наконечник закреплен прочно.

Внимание! Следите за тем, чтобы в наконечнике была металлическая пластинка. Она защищает наконечник от прорыва трубкой опоры. Результатом этого может стать повреждение напольного покрытия или падение.





Техническое обслуживание

Уход

Корпус опоры достаточно протереть влажной тряпкой и затем вытереть насухо. Все части из искусственных материалов очищайте при помощи специальных чистящих средств.

Внимание! Не используйте содержащие растворители или масляные чистящие средства.

Обслуживание

Перед каждым использованием проверяйте опору на предмет повреждений. Убедитесь, что клип-фиксатор (нажимная кнопка) и наконечник или колёса (при наличии) прочно закреплены, а труба находится в правильном положении.

Ремонт

Для проведения ремонтных работ обратитесь к торговому представителю. В целях безопасности для ремонта в качестве замены должны использоваться только оригинальные запчасти.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Генеральный директор ООО «СИМС-2»



С.П.