

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «Альфа-Медика»
П.В. Козлов
2012г

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Изделия протезно-ортопедические: бандажи на верхние конечности, бандажи на грудную область, бандажи для фиксации в выгодном физиологичном положении органов брюшной полости и малого таза, бандажи на шейный отдел позвоночника, корсеты ортопедические, корректоры осанки

производства B. Well Swiss AG (Би.Велл Свисс АГ), Швейцария.

2012

Содержание

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ**
- 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- 3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**
- 4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ**
- 5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ**
- 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ**

Производитель:

B. Well Swiss AG, Gartenstrasse 9a, CH-9435 Heerbrugg, Switzerland

Би.Велл Свисс АГ, Гартенштрассе 9а, СН-9435 Хеербругг, Швейцария

Заводы-изготовители:

1. Vega Technologies Inc., 11F-13, No. 100, Chang Chun Road, Taipei, Taiwan
(Вега Технолоджис Инк., 11F-13, №100, Чанг Чун Роуд, Тайбэй, Тайвань)
2. Rehan (Shanghai) Health Care Co., Ltd., No.58 1385 Lane, Jihe Rd, Huaxin Town, Qingpu Dist., Shanghai, China
(Рехан (Шанхай) Хелс Каре Ко., Лтд., №58 1385 Лейн, Джихе Роуд, Хуаксин Таун, Квингпу Дистрикт, Шанхай, Китай)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Изделия протезно-ортопедические: бандажи на верхние конечности, бандажи на грудную область, бандажи для фиксации в выгодном физиологичном положении органов брюшной полости и малого таза, бандажи на шейный отдел позвоночника, корсеты ортопедические, корректоры осанки (далее – изделия, бандажи и корсеты) применяются для компрессии и фиксации органов, конечностей; различных отделов позвоночника и туловища человека.

Бандажи и корсеты используются как средство восстановления утраченных форм и функций опорно-двигательной системы и предназначены для поддержания органов брюшной полости и малого таза; для фиксации брюшной полости после операций и предупреждения растяжения брюшной стенки во время беременности; компрессии тканей в сочетании с фиксации поврежденных суставов; заболеваниях, повреждениях и искривлениях различных отделов позвоночника; для создания утягивающего эффекта.

Изделия протезно-ортопедические выпускаются в следующем ассортименте:

1. Бандажи на грудную область: W-411 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-412 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-413 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-414 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-415 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-416 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL);

2. Бандажи на брюшную стенку: W-421 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-422 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-423 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-424 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-425 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-426 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-427 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-428 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL);
3. Бандажи на шейный отдел позвоночника: W-121 (размер: S, M, L, S1, M1, L1, S2, M2, L2), W-122 P (размер: S/M, L/XL, S1/M1, L1/XL1), W-123 (размер: S, M, L, S1, M1, L1, S2, M2, L2), W-124 P (размер: S/M, L/XL, S1/M1, L1/XL1), W-125 (S, M, L, S1, M1, L1, S2, M2, L2);
4. Бандажи на локтевой сустав: W-231 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-232 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-233 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-234 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-235 (размер: S/M, L/XL), W-236 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL);
5. Бандажи на плечевой сустав: W-221 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-222 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-223 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-224 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-225 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-226 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL);
6. Бандажи на руку: W-211 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-212 (размер: S/M, L/XL), W-213 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-214 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-215 (размер: S/M, L/XL), W-216 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL);
7. Бандажи на лучезапястный сустав: W-241 (размер: XS, S, M, L, XL), W-242 (размер: XS, S, M, L, XL), W-243 (размер: XS, S, M, L, XL), W-244 (размер: универсальный), W-245 (размер: универсальный), W-246 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-247 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL);
8. Бандажи на лучезапястный сустав и пальцы: W-251 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL), W-254 (размер: XS, S, M, L, XL), W-255 (размер: S, M, L), W-257 (размер: XS, S, M, L, XL);
9. Бандажи на суставы пальцев: W-252 (размер: S, M, L), W-253 (размер: S, M, L), W-256 (размер: S, M, L);
10. Корсеты ортопедические: W-141 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-142 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-143 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-144 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-145 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-146 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-151 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-152 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL);

XXXL), W-153 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-154 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-155 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-156 (размер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL);

11. Корректоры осанки: W-111 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-112 P (размер: S, M, L), W-113 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-114 P (размер: S, M, L), W-131 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-132 P (размер: S, M, L), W-133 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-134 P (размер: S, M, L), W-135 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-136 P (размер: S, M, L);

12. Бандажи на область малого таза: W-431 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-432 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-433 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-434 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-435 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-436 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL), W-437 (размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL);

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики отдельных моделей представлены в таблице 1:

Таблица 1

Вариант исполнения	Модель	Краткая характеристика.
Бандажи на грудную область		
Бандаж на грудную область	W-411	Бандаж для фиксации грудной клетки. Ограничивает экскурсию легких. Мужская модель. Используется после травм и операций на грудной клетке, а также при межреберной невралгии.
Бандаж на грудную область	W-412	Бандаж для фиксации грудной клетки. Ограничивает экскурсию легких. Женская модель. Используется после травм и операций на грудной клетке, а также при межреберной невралгии.
Бандаж на грудную область	W-413	Бандаж для фиксации груди после операций, в том числе после мастэктомии. Оказывает фиксирующее, компрессионное воздействие, способствует улучшению кровообращения мягких тканей груди. Женская модель.

Бандаж на грудную область	W-414	Бандаж для фиксации груди после операций, в том числе после мастэктомии. Оказывает фиксирующее, компрессионное воздействие, способствует улучшению кровообращения мягких тканей груди. Женская модель.
Бандаж на грудную область	W-415	Бандаж для фиксации груди после операций, в том числе после мастэктомии. Оказывает фиксирующее, компрессионное воздействие, способствует улучшению кровообращения мягких тканей груди. Женская модель.
Бандаж на грудную область	W-416	Бандаж для фиксации груди после операций, в том числе после мастэктомии. Оказывает фиксирующее, компрессионное воздействие, способствует улучшению кровообращения мягких тканей груди. Женская модель.
Бандажи на брюшную стенку		
Бандаж на брюшную стенку	W-421	Бандаж для фиксации, поддержки мышц брюшной стенки. Компенсирует функции мышц, оказывает компрессионное воздействие, способствует улучшению кровообращения. Разъемная конструкция.
Бандаж на брюшную стенку	W-422	Бандаж для фиксации, поддержки мышц брюшной стенки. Компенсирует функции мышц, оказывает компрессионное воздействие, способствует улучшению кровообращения. Высокая модель. Разъемная конструкция.
Бандаж на брюшную стенку	W-423	Бандаж для фиксации, поддержки мышц брюшной стенки. Компенсирует функции мышц, оказывает компрессионное воздействие, способствует улучшению кровообращения. Мягкая неразъемная конструкция.
Бандаж на брюшную стенку	W-424	Бандаж для фиксации, поддержки мышц брюшной стенки. Компенсирует функции мышц, оказывает компрессионное воздействие, способствует улучшению кровообращения. Высокая модель. Мягкая неразъемная конструкция.
Бандаж на брюшную стенку	W-425	Бандаж для фиксации, поддержки мышц брюшной стенки. Компенсирует функции мышц, оказывает компрессионное воздействие, способствует улучшению

		кровообращения. Мягкая разъемная конструкция.
Бандаж на брюшную стенку	W-426	Бандаж для фиксации, поддержки мышц брюшной стенки. Компенсирует функции мышц, оказывает компрессионное воздействие, способствует улучшению кровообращения. Высокая модель. Мягкая разъемная конструкция.
Бандаж на брюшную стенку	W-427	Бандаж для фиксации, поддержки мышц брюшной стенки. Компенсирует функции мышц, оказывает компрессионное воздействие, способствует улучшению кровообращения. Предусмотрена возможность применения для стомированных больных. Разъемная конструкция.
Бандаж на брюшную стенку	W-428	Бандаж для фиксации, поддержки мышц брюшной стенки. Компенсирует функции мышц, оказывает компрессионное воздействие, способствует улучшению кровообращения. Предусмотрена возможность применения для стомированных больных. Высокая модель. Разъемная конструкция.
Бандажи на шейный отдел позвоночника		
Бандаж на шейный отдел позвоночника	W-121	Бандаж на шейный отдел позвоночника для мягкой фиксации и разгрузки шейного отдела позвоночника. Поддерживает шейные позвонки в прямом положении, обеспечивает согревающее и мягкое массажное действие. Застежка-липучка позволяет обеспечить прилегание бандажа к шее.
Бандаж на шейный отдел позвоночника	W-122 Р	Бандаж на шейный отдел позвоночника для детей позволяет мягко зафиксировать правильное положение шеи, разгрузить и поддержать шейные позвонки. Обеспечивает теплосберегающее и мягкое массажное воздействие.
Бандаж на шейный отдел позвоночника	W-123	Бандаж на шейный отдел позвоночника позволяет зафиксировать правильное положение шеи, разгрузить и поддержать шейные позвонки. Обеспечивает

		полужесткой воздействию на шейный отдел позвоночника благодаря пластиковой вставке, а также теплосберегающее и мягкое массажное воздействие на мягкие ткани шеи.
Бандаж на шейный отдел позвоночника	W-124 P	Бандаж на шейный отдел позвоночника для детей позволяет фиксировать шейного отдела позвоночника с отверстием в области трахеи. Позволяет зафиксировать правильное положение шеи и головы, разгрузить и поддержать шейные позвонки, ограничить наклоны головы. Отверстие в бандаже позволяет беспрепятственно контролировать состояние кожных покровов шеи, трахеостомы и ухаживать за ней.
Бандаж на шейный отдел позвоночника	W-125	Бандаж на шейный отдел позвоночника позволяет фиксировать шейного отдела позвоночника с отверстием в области трахеи. Позволяет зафиксировать правильное положение шеи и головы, разгрузить и поддержать шейные позвонки, ограничить наклоны головы. Отверстие в бандаже позволяет беспрепятственно контролировать состояние кожных покровов шеи, трахеостомы и ухаживать за ней.
Бандажи на локтевой сустав		
Бандаж на локтевой сустав	W-231	Обеспечивает компрессию, мягкую фиксацию и стабилизацию локтевого сустава. Способствует уменьшению отека и улучшению кровообращения.
Бандаж на локтевой сустав	W-232	Обеспечивает компрессию, мягкую фиксацию и стабилизацию локтевого сустава. Способствует уменьшению отека и улучшению кровообращения. Мягкие вставки способствуют усилению проприоцептивного контроля.
Бандаж на локтевой сустав	W-233	Обеспечивает компрессию, мягкую фиксацию и стабилизацию локтевого сустава. Способствует уменьшению отека и улучшению кровообращения.

		Дополнительный ремень усиливает фиксирующие свойства Бандажа.
Бандаж на локтевой сустав	W-234	Обеспечивает компрессию, мягкую фиксацию и стабилизацию локтевого сустава. Способствует уменьшению отека и улучшению кровообращения. Система фиксирующих ремней позволяет ограничивать объем движения в локтевом суставе.
Бандаж на локтевой сустав	W-235	Обеспечивает фиксацию сухожилий мышц сгибателей-разгибателей, разгружая локтевой сустав.
Бандаж на локтевой сустав	W-236	Обеспечивает фиксацию и стабилизацию локтевого сустава. Позволяет регулировать объем движения в локтевом суставе и ограничивать крайние положения руки при сгибании-разгибании в локтевом суставе.
Бандажи на плечевой сустав		
Бандаж на плечевой сустав	W-221	Обеспечивает компрессию, мягкую фиксацию и стабилизацию плечевого сустава. Способствует уменьшению отека и улучшению кровообращения.
Бандаж на плечевой сустав	W-222	Обеспечивает компрессию, мягкую фиксацию и стабилизацию плечевого сустава. Способствует уменьшению отека и улучшению кровообращения. Мягкие вставки способствуют усилению проприоцептивного контроля. Система фиксирующих ремней позволяет ограничивать отведение плеча.
Бандаж на плечевой сустав	W-223	Обеспечивает компрессию, фиксацию и стабилизацию плечевого сустава. Согревает, способствует улучшению кровообращения.
Бандаж на плечевой сустав	W-224	Обеспечивает компрессию, фиксацию и стабилизацию плечевого сустава. Система фиксирующих ремней позволяет ограничивать отведение плеча. Способствует улучшению кровообращения, уменьшению отека.
Бандаж на плечевой сустав	W-225	Обеспечивает фиксацию и стабилизацию плечевого сустава в положении отведения до 45 градусов.
Бандаж на плечевой сустав	W-226	Обеспечивает фиксацию и стабилизацию плечевого сустава в положении отведения от 60 градусов.

Бандажи на руку		
Бандаж на руку	W-211	Бандаж состоит из поддерживающей муфты из воздухопроницаемой ткани и фиксирующих ремней. Позволяет обеспечить поддержку руки в заданном положении. Разгружает суставы руки при заболеваниях, травмах и в послеоперационном периоде.
Бандаж на руку	W-212	Бандаж облегченной конструкции позволяет обеспечить поддержку руки. Разгружает суставы руки при заболеваниях, травмах и в послеоперационном периоде.
Бандаж на руку	W-213	Бандаж состоит из плечевой муфты и фиксирующих ремней. Позволяет обеспечить поддержку руки в заданном положении. Фиксирует плечо, разгружает суставы руки при заболеваниях, травмах и в послеоперационном периоде.
Бандаж на руку	W-214	Бандаж облегченной конструкции позволяет обеспечить поддержку руки. Фиксирует нужное положение руки. Разгружает суставы руки при заболеваниях, травмах и в послеоперационном периоде.
Бандаж на руку	W-215	Бандаж позволяет фиксировать руку к телу в нужном положении. Обеспечивает разгрузку суставов руки, фиксацию плеча при заболеваниях, травмах и в послеоперационном периоде.
Бандаж на руку	W-216	Бандаж позволяет фиксировать плечевой сустав и руку в нужном положении. Обеспечивает разгрузку плечевого и других суставов руки при заболеваниях, травмах и в послеоперационном периоде.
Бандажи на лучезапястный сустав		
Бандаж на лучезапястный сустав	W-241	Обеспечивает легкую фиксацию и компрессию мягких тканей лучезапястного сустава. Способствует улучшению кровообращения мягких тканей сустава.
Бандаж на лучезапястный сустав	W-242	Обеспечивает легкую фиксацию, согревание и компрессию мягких тканей лучезапястного сустава. Способствует улучшению кровообращения мягких тканей сустава.

Бандаж на лучезапястный сустав	W-243	Обеспечивает легкую фиксацию, согревание и компрессию мягких тканей лучезапястного сустава. Способствует улучшению кровообращения мягких тканей сустава. Мягкие вставки увеличивают проприоцепцию и способствуют стабилизации сустава.
Бандаж на лучезапястный сустав	W-244	Обеспечивает легкую фиксацию, компрессию мягких тканей лучезапястного сустава. Способствует уменьшению отека и стабилизирует сустав. Ленточный принцип фиксации позволяет регулировать степень компрессии.
Бандаж на лучезапястный сустав	W-245	Обеспечивает легкую фиксацию, компрессию мягких тканей лучезапястного сустава. Способствует уменьшению отека и стабилизирует сустав. Дополнительный фиксирующий ремень позволяет регулировать степень компрессии.
Бандаж на лучезапястный сустав	W-246	Бандаж фиксирует, разгружает сустав, позволяет зафиксировать положение лучезапястного сустава, оставляет ладонь свободной. Может применяться как в профилактических, так и в лечебных целях.
Бандаж на лучезапястный сустав	W-247	Удлиненный бандаж фиксирует, разгружает сустав, позволяет зафиксировать положение лучезапястного сустава и предплечья, оставляет ладонь свободной. Может применяться как в профилактических, так и в лечебных целях.
Бандажи на лучезапястный сустав и пальцы		
Бандаж на лучезапястный сустав и пальцы	W-251	Бандаж позволяет зафиксировать I палец руки в положении отведения. Оказывает компрессионное воздействие на лучезапястный сустав. Может применяться как в профилактических, так и в лечебных целях.
Бандаж на лучезапястный сустав и пальцы	W-254	Бандаж позволяет зафиксировать ладонь, лучезапястный сустав и суставы пальцев руки в нужном положении.

Бандаж на лучезапястный сустав и пальцы	W-255	Бандаж позволяет зафиксировать лучезапястный сустав и суставы пальцев руки в нужном положении.
Бандаж на лучезапястный сустав и пальцы	W-257	Удлиненный Бандаж позволяет зафиксировать лучезапястный сустав и I палец руки в положении отведения. Оказывает компрессионное воздействие на лучезапястный сустав.
Бандажи на суставы пальцев		
Бандаж на суставы пальцев	W-252	Бандаж позволяет зафиксировать суставы пальцев руки.
Бандаж на суставы пальцев	W-253	Бандаж позволяет зафиксировать суставы пальцев руки.
Бандаж на суставы пальцев	W-256	Бандаж позволяет зафиксировать суставы пальцев руки.
Корсеты ортопедические		
Корсет ортопедический	W-141	Корсет ортопедический с гибкими ребрами жесткости. Нормализует тонус мышц спины, предохраняет поясничный отдел позвоночника от перегрузок и, как следствие, травм и обострения заболеваний при активной физической работе. Стабилизирует суставно-связочный аппарат поясничного отдела.
Корсет ортопедический	W-142	Корсет ортопедический с гибкими ребрами жесткости. Нормализует тонус мышц спины, предохраняет поясничный отдел позвоночника от перегрузок и, как следствие, травм и обострения заболеваний при активной физической работе. Стабилизирует суставно-связочный аппарат поясничного отдела. Дополнительные наплечные фиксирующие ремни позволяют надевать корсет с дополнительным поддерживающим эффектом.
Корсет ортопедический	W-143	Корсет ортопедический с гибкими ребрами жесткости из теплосберегающего материала. Нормализует тонус мышц спины, предохраняет поясничный отдел

		позвоночника от перегрузок и, как следствие, травм и обострения заболеваний при активной физической работе. Стабилизирует суставно-связочный аппарат поясничного отдела. Теплосберегающий эффект способствует согреванию мягких тканей и улучшению кровообращения.
Корсет ортопедический	W-144	Корсет ортопедический с гибкими ребрами жесткости из дышащего материала. Нормализует тонус мышц спины, предохраняет поясничный отдел позвоночника от перегрузок и, как следствие, травм и обострения заболеваний при активной физической работе. Стабилизирует суставно-связочный аппарат поясничного отдела. Дополнительные фиксирующие ремни способствуют лучшему прилеганию корсета к телу.
Корсет ортопедический	W-145	Корсет ортопедический с гибкими ребрами жесткости из дышащего материала. Нормализует тонус мышц спины, предохраняет поясничный отдел позвоночника от перегрузок и, как следствие, травм и обострения заболеваний при активной физической работе. Стабилизирует суставно-связочный аппарат поясничного отдела. Дополнительные фиксирующие ремни способствуют лучшему прилеганию корсета к телу. Высота корсета позволяет фиксировать нижнегрудную область спины.
Корсет ортопедический	W-146	Корсет ортопедический с гибкими ребрами жесткости из дышащего материала. Нормализует тонус мышц спины, предохраняет поясничный отдел позвоночника от перегрузок и, как следствие, травм и обострения заболеваний при активной физической работе. Стабилизирует суставно-связочный аппарат поясничного отдела. Дополнительные фиксирующие ремни способствуют лучшему прилеганию корсета к телу.

Корсет ортопедический	W-151	Корсет ортопедический с гибкими ребрами жесткости. Нормализует тонус мышц спины, предохраняет пояснично-крестцовый отдел позвоночника от перегрузок и, как следствие, травм и обострения заболеваний при активной физической работе. Стабилизирует суставно-связочный аппарат пояснично-крестцового отдела.
Корсет ортопедический	W-152	Корсет ортопедический с металлическими ребрами жесткости. Нормализует тонус мышц спины, предохраняет пояснично-крестцовый отдел позвоночника от перегрузок и, как следствие, травм и обострения заболеваний при нагрузках. Стабилизирует и разгружает суставно-связочный аппарат пояснично-крестцового отдела.
Корсет ортопедический	W-153	Корсет ортопедический с металлическими ребрами жесткости. Нормализует тонус мышц спины, предохраняет пояснично-крестцовый отдел позвоночника от перегрузок и, как следствие, травм и обострения заболеваний при нагрузках. Стабилизирует и разгружает суставно-связочный аппарат пояснично-крестцового отдела. Высота корсета позволяет дополнительно стабилизировать нижнегрудную область спины.
Корсет ортопедический	W-154	Корсет ортопедический с металлическими ребрами жесткости. Нормализует тонус мышц спины, предохраняет пояснично-крестцовый отдел позвоночника от перегрузок и, как следствие, травм и обострения заболеваний при нагрузках. Стабилизирует и разгружает суставно-связочный аппарат пояснично-крестцового отдела. Высота корсета позволяет дополнительно стабилизировать нижнегрудную область спины. Дополнительные фиксирующие ремни обеспечивают лучшее прилегание корсета к телу.

Корсет ортопедический	W-155	Корсет ортопедический с ребрами жесткости. Нормализует тонус мышц спины, предохраняет пояснично-крестцовый отдел позвоночника от перегрузок и, как следствие, травм и обострения заболеваний при нагрузках. Стабилизирует и разгружает суставно-связочный аппарат пояснично-крестцового отдела. Сборная конструкция позволяет увеличивать объем работы мышечного корсета по мере выздоровления пациента.
Корсет ортопедический	W-156	Корсет ортопедический с металлическими ребрами жесткости. Нормализует тонус мышц спины, предохраняет пояснично-крестцовый отдел позвоночника от перегрузок и, как следствие, травм и обострения заболеваний при нагрузках. Стабилизирует и разгружает суставно-связочный аппарат пояснично-крестцового отдела. Дополнительные фиксирующие ремни обеспечивают лучшее прилегание корсета к телу.
Корректоры осанки		
Корректор осанки	W-111	Полужесткий корректор. Способствует формированию физиологически правильной осанки, нормализации тонуса мышц и закреплению корректного мышечного стереотипа. Может быть отрегулирован при необходимости
Корректор осанки	W-112 P	Полужесткий корректор. Способствует формированию физиологически правильной осанки у детей, нормализации тонуса мышц и закреплению корректного мышечного стереотипа. Может быть отрегулирован при необходимости. Мягкие ремни обеспечивают реклинацию плечевого отдела
Корректор осанки	W-113	Полужесткий корректор. Наплечные ремни удерживают плечи в правильном положении, мягко распределяют давление на плечи. Дополнительные фиксирующие ремни вокруг туловища обеспечивают лучшее прилегание. Жесткие ребра обеспечивают коррекцию

		осанки и нормализацию тонуса мышц.
Корректор осанки	W-114 P	Полужесткий корректор для детей. Наплечные ремни удерживают плечи в правильном положении, мягко распределяют давление на плечи. Дополнительные фиксирующие ремни вокруг туловища обеспечивают лучшее прилегание. Жесткие ребра обеспечивают коррекцию осанки и нормализацию тонуса мышц.
Корректор осанки	W-131	Мягкий корректор. Способствует формированию физиологически правильной осанки, нормализации тонуса мышц и закреплению корректного мышечного стереотипа. Может быть отрегулирован при необходимости при помощи эластичных ремней.
Корректор осанки	W-132 P	Мягкий корректор для детей. Способствует формированию физиологически правильной осанки, нормализации тонуса мышц и закреплению корректного мышечного стереотипа. Может быть отрегулирован при необходимости при помощи эластичных ремней.
Корректор осанки	W-133	Мягкий корректор осанки. Способствует формированию физиологически правильной осанки за счет реклинирующего воздействия на плечевой пояс и закреплению корректного мышечного стереотипа.
Корректор осанки	W-134 P	Мягкий корректор осанки для детей. Способствует формированию физиологически правильной осанки за счет реклинирующего воздействия на плечевой пояс и закреплению корректного мышечного стереотипа.

Корректор осанки	W-135	Корректор осанки предназначен для верхнего плечевого пояса. Фиксирует (компенсирует недостаточность связочного аппарата) плечевые суставы в положении отведения назад, частично или полностью снимает напряжение мышц ключичной области, оказывает незначительное реклинирующее воздействие на область верхнегрудного отдела позвоночника, уменьшает объём движения лопаток.
Корректор осанки	W-136 P	Корректор осанки детский предназначен для верхнего плечевого пояса. Фиксирует (компенсирует недостаточность связочного аппарата) плечевые суставы в положении отведения назад, частично или полностью снимает напряжение мышц ключичной области, оказывает незначительное реклинирующее воздействие на область верхнегрудного отдела позвоночника, уменьшает объём движения лопаток.
Бандажи на область малого таза		
Бандаж на область малого таза	W-431	Бандаж для фиксации органов малого таза в нужном положении. Поддерживает живот, уменьшает боли в области таза, пояснично-крестцового отдела позвоночника, способствует восстановлению и нормализации тонуса мышц живота. Воздухопроницаемый эластичный материал, из которого изготовлен бандаж, обеспечивает комфорт при использовании
Бандаж на область малого таза	W-432	Бандаж для фиксации органов малого таза в нужном положении. Уменьшает боли в тазовой области, способствует нормализации тонуса мышц тазовой области. Возможность регулирования компрессии на мышцы тазовой области.
Бандаж на область малого таза	W-433	Бандаж для фиксации органов малого таза в нужном положении. Поддерживает живот, уменьшает боли в области таза, пояснично-крестцового отдела позвоночника, способствует восстановлению и

		нормализации тонуса мышц живота. Воздухопроницаемый эластичный материал, из которого изготовлен бандаж, обеспечивает комфорт при использовании
Бандаж на область малого таза	W-434	Бандаж для фиксации органов мошонки в нужном положении при их острых воспалительных заболеваниях, гидроцеле, варикоцеле, травматических гематомах и пахово-мошоночных грыжах. Способствует уменьшению отека.
Бандаж на область малого таза	W-435	Бандаж для фиксации органов малого таза. Возможность регулирования компрессии позволяет ограничивать смещение внутренних органов.
Бандаж на область малого таза	W-436	Бандаж для фиксации органов малого таза в нужном положении. Уменьшает боли в тазовой области, способствует нормализации тонуса мышц тазовой области. Возможность регулирования компрессии на мышцы тазовой области. Дополнительные ремни предупреждают смещение бандажа во время движения.
Бандаж на область малого таза	W-437	Бандаж для фиксации органов малого таза в нужном положении. Поддерживает живот, поясничный отдел, уменьшает боли в области таза, пояснично-крестцового отдела позвоночника, способствует восстановлению и нормализации тонуса мышц живота. Воздухопроницаемый эластичный материал, из которого изготовлен бандаж, обеспечивает комфорт при использовании

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаниями к применению изделий являются:

1. Индивидуальная непереносимость материалов
2. Для изделий, содержащих в составе неопрен/аэропрен не рекомендуется применение в первые 3 суток после острой травмы.

Предупреждения:

при нарушении кожных покровов (дерматозы, гнойные инфекционные воспаления в области применения) перед применением необходима консультация врача.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Для подбора типа и модели бандажа или корсета следует руководствоваться данными, представленными в таблице 1, а также рекомендациями врача. Рекомендуется, чтобы подбор модели изделия и степени (класса) компрессии осуществлял врач, исходя из индивидуальных особенностей пациента.

Перед применением следует измерить параметры тела больного и определить подходящий типоразмер бандажа или корсета, в соответствии с таблицами в Приложении 1. Следует выбрать интересующую Вас модель бандажа или корсета и измерить в параметры тела, указанные в таблице. После найти интервал значений параметра, которому соответствует измеренный Вами параметр, и определить подходящий типоразмер в соответствующем столбце.

При подборе модели рекомендуется примерка изделия.

Применение изделий может осуществляться в стационарных, поликлинических и домашних условиях.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

После подбора модели и типоразмера изделия, его следует надеть на пациента (самостоятельно или с посторонней помощью) таким образом, как представлено на фотографии изделия в Приложении 2, зафиксировав при необходимости дополнительными ремнями/лентами. Важно избегать при ношении слишком сильной компрессии тканей, чтобы не вызвать нарушение кровообращения или нарушения функций находящихся поблизости нервов.

Дополнительные рекомендации по ношению бандажей и корсетов при необходимости можно получить у лечащего врача.

Если иного не предписано врачом, вначале время ношения бандажа или корсета следует ограничить двумя часами, постепенно доводя длительность применения до шестнадцати часов в сутки (для изделий из неопрена/аэропрена до 4-6 часов в сутки).

На ночь изделие следует снимать.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ и УХОДА

Изделия должны храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от -20 до $+50^{\circ}\text{C}$;
- относительная влажность, не более 70%;

Защищать от непрямого и прямого воздействия солнечного или искусственного света.

Гарантийный срок сохранения медицинских свойств изделий – 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

В комплект поставки входят:

- Бандаж или корсет одного вида (одной модели)
- инструкция;
- упаковка.

Правила ухода:

Стирать изделие следует вручную в воде с температурой до 30°C с добавлением моющих средств, не содержащие хлор и химически активные добавки. Не применять машинную сушку. Сушить изделия следует не отжимая, разложив их на полотенце, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей

Изделие выдерживает не менее 40 стирок.

Не следует носить бандажи и корсеты влажными или мокрыми, а также мочить во время хранения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблицы размеров продукции «Изделия протезно-ортопедические: бандажи на верхние конечности, бандажи на грудную область, бандажи для фиксации в выгодном физиологичном положении органов брюшной полости и малого таза, бандажи на шейный отдел позвоночника, корсеты ортопедические, корректоры осанки»:

Бандажи на грудную область						
	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Окружность груди, см	До 82	82-96	96-110	110-124	124-135	Более 134

Бандажи на брюшную стенку						
	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Окружность талии, см	75-85	85-95	95-105	105-120	120-135	Более 135

Бандажи на шейный отдел позвоночника									
модели W-121, W-123, W-125									
	S	M	L	S1	M1	L1	S2	L2	M2
Окружность шеи, см	35-45	35-45	35-45	30-35	30-35	30-35	30-35	35-45	35-45
Высота шеи, см	8	9	10	8	9	10	11	11	12
модели W-122 P W-124 P									
	S/M	L/XL	S1/M1	L1/XL1					
Окружность шеи, см	До 25	До 25	20-32	20-32					
Высота шеи, см	4	5	6	7					

Бандажи на локтевой сустав						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружность локтевого сустава, см	До 24	24- 26	26-28	28-31	31-34	Более 34
Модель W-235						
	S/M	L/XL				
Окружность локтевого сустава, см	До 30	Более 30				

Бандажи на плечевой сустав						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружность бицепса, см	До 28	28-32	32-35	35-38	38-42	Более 42
Модели W-225, W-226						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Расстояние от локтевого сустава до плуснефалангового сустава, см	27-30	30-33	33-36	36-39	39-42	Более 42

Бандажи на руку						
модели W-211, W-213, W-214						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Расстояние от локтевого сустава до плюснефалангового сустава, см	27-30	30-33	33-36	36-39	39-42	Более 42
Модель W-212, W-215						
	S/M	L/XL				
Окружность грудной клетки с прижатой рукой, см	До 100	Более 100				
Модель W-216						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружность грудной клетки с прижатой рукой, см	72-81	81-89	89-97	97-105	105-113	113-122

Бандажи на лучезапястный сустав					
	XS	S	M	L	XL
Окружность лучезапястного сустава, см	До 15	15-17	17-19	19-22	22-24
Модель W-245 – размер универсальный					

Бандажи на лучезапястный сустав и пальцы W-255, W-256						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Длина ладони, см	До 12	12-15	15- 17	17 –20	20- 22	Более 22

Бандажи на суставы пальцев			
	S	M	L
Длина пальца, см	До 6	6-9	Более 9

Корсеты ортопедические							
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Окружность между талией и бедрами, см	До 70	70-85	85-97	97-105	105-115	115-123	Более 123
Модель W-143							
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Окружность талии, см	До 70	70- 82	82-92	92-102	102-112	112-122	Более 122
Модель W-151							
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Окружность бедер, см	До 82	82- 92	92-100	100-110	110-120	120-130	Более 130

Корректоры осанки							
Модели W-131, W-133, W-135							
	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Окружность грудной клетки, см	60-75	75-90	90-105	105-119	119-130	Более 130	
Модели W-132 P, W-134 P, W-136 P							
	S	M	L				
Окружность грудной клетки, см	48-54	54-66	66-78				
Модели W-111, W-113							
	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Окружности между бедрами и талией, см	60-75	70-85	80-95	90-110	110-125	Более 125	
Модели W-112 P, W-114 P							
	S	M	L				
Окружности талии, см	45-55	55-65	65-75				

Бандажи на область малого таза							
W-431, W-432, W-433, W-436, W-437							
	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Окружность туловища под животом, см	До 85	85-97	97-105	105-115	115-125	Более 125	
W-434, W-435							
	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Окружность между талией и бедрами, см	До 85	85-95	95-105	105-115	115-125	Более 125	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Внешний вид изделия медицинского назначения «Изделия протезно-ортопедические: бандажи на верхние конечности, бандажи на грудную область, бандажи для фиксации в выгодном физиологичном положении органов брюшной полости и малого таза, бандажи на шейный отдел позвоночника, корсеты ортопедические, корректоры осанки» представлен в таблице:

Наименование	Артикул	Фотография
Бандажи на грудную область		
Бандажи на грудную область	W-411	
Бандажи на грудную область	W-412	
Бандажи на грудную область	W-413	
Бандажи на грудную область	W-414	

Бандажи на грудную область	W-415	
Бандажи на грудную область	W-416	
Бандажи на брюшную стенку		
Бандажи на брюшную стенку	W-421	
Бандажи на брюшную стенку	W-422	
Бандажи на брюшную стенку	W-423	
Бандажи на брюшную стенку	W-424	

Бандажи на брюшную стенку	W-425	
Бандажи на брюшную стенку	W-426	
Бандажи на брюшную стенку	W-427	
Бандажи на брюшную стенку	W-428	
Бандажи на шейный отдел позвоночника		
Бандажи на шейный отдел позвоночника	W-121	
Бандажи на шейный отдел позвоночника	W-122 P	

Бандажи на шейный отдел позвоночника	W-123	
Бандажи на шейный отдел позвоночника	W-124 P	
Бандажи на шейный отдел позвоночника	W-125	
Бандажи на локтевой сустав		
Бандажи на локтевой сустав	W-231	
Бандажи на локтевой сустав	W-232	
Бандажи на локтевой сустав	W-233	

Бандажи на локтевой сустав	W-234	
Бандажи на локтевой сустав	W-235	
Бандажи на локтевой сустав	W-236	
Бандажи на плечевой сустав		
Бандажи на плечевой сустав	W-221	
Бандажи на плечевой сустав	W-222	
Бандажи на плечевой сустав	W-223	

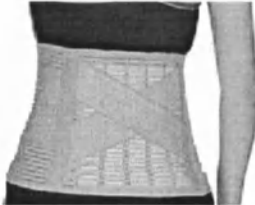
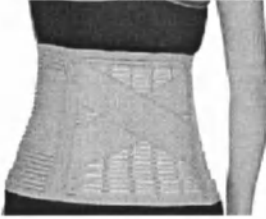
Бандажи на плечевой сустав	W-224	
Бандажи на плечевой сустав	W-225	
Бандажи на плечевой сустав	W-226	
Бандажи на руку		
Бандажи на руку	W-211	
Бандажи на руку	W-212	
Бандажи на руку	W-213	

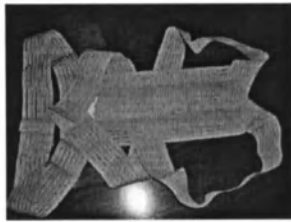
Бандажи на руку	W-214	
Бандажи на руку	W-215	
Бандажи на руку	W-216	
Бандажи на лучезапястный сустав		
Бандажи на лучезапястный сустав	W-241	
Бандажи на лучезапястный сустав	W-242	
Бандажи на лучезапястный сустав	W-243	

Бандажи на лучезапястный сустав	W-244	
Бандажи на лучезапястный сустав	W-245	
Бандажи на лучезапястный сустав	W-246	
Бандажи на лучезапястный сустав	W-247	
Бандажи на лучезапястный сустав и пальцы		
Бандажи на лучезапястный сустав и пальцы	W-251	
Бандажи на лучезапястный сустав и пальцы	W-254	

Бандажи на лучезапястный сустав и пальцы	W-255	
Бандажи на лучезапястный сустав и пальцы	W-257	
Бандажи на суставы пальцев		
Бандажи на суставы пальцев	W-252	
Бандажи на суставы пальцев	W-253	
Бандажи на суставы пальцев	W-256	
Корсеты ортопедические		

Корсеты ортопедические	W-141	
Корсеты ортопедические	W-142	
Корсеты ортопедические	W-143	
Корсеты ортопедические	W-144	
Корсеты ортопедические	W-145	
Корсеты ортопедические	W-146	

Корсеты ортопедические	W-151	
Корсеты ортопедические	W-152	
Корсеты ортопедические	W-153	
Корсеты ортопедические	W-154	
Корсеты ортопедические	W-155	
Корсеты ортопедические	W-156	
Корректоры осанки		

Корректоры осанки	W-111	
Корректоры осанки	W-112 P	
Корректоры осанки	W-113	
Корректоры осанки	W-114 P	
Корректоры осанки	W-131	
Корректоры осанки	W-132 P	

Корректоры осанки	W-133	
Корректоры осанки	W-134 P	
Корректоры осанки	W-135	
Корректоры осанки	W-136 P	
Бандажи на область малого таза		
Бандажи на область малого таза	W-431	
Бандажи на область малого таза	W-432	

Бандажи на область малого таза	W-433	
Бандажи на область малого таза	W-434	
Бандажи на область малого таза	W-435	
Бандажи на область малого таза	W-436	
Бандажи на область малого таза	W-437	



Слито и скреплено печатью 37 листов

Генеральный директор
ЗАО «Альфа-Медика»

П.В. Козлов.

Дата: 08 октября 2012 г.