



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «НЗИВ»

Г.Ю. Вареница

«*сентябрь*» 2023

Инструкция по применению на медицинское изделие

Емкость-контейнер многоразовый для сбора, хранения

и транспортирования медицинских отходов

по ТУ 32.50.50-083-07511703-2022

Содержание

1	Наименование медицинского изделия	3
2	Сведения о разработчике и производителе медицинского изделия	4
3	Классификация	4
4	Назначение	4
5	Область применения	4
6	Потенциальные потребители	4
7	Показания к применению	4
8	Противопоказания и возможные побочные действия	5
9	Описание медицинского изделия	5
10	Меры предосторожности	5
11	Технические характеристики	5
12	Порядок работы с емкостью-контейнером многоразовым для сбора, хранения транспортирования медицинских отходов	7
13	Комплект поставки	7
14	Маркировка медицинского изделия	8
15	Перечень применяемых производителем медицинского изделия национальных стандартов ..	10
16	Очистка и дезинфекция	10
17	Стерилизация	10
18	Техническое обслуживание и ремонтпригодность	11
19	Условия эксплуатации, хранения и транспортирования	11
20	Утилизация медицинского изделия	11
21.	Информация о сроке службы и сроке хранения	12
22.	Гарантийные обязательства	13
23.	Рекламации	13
	Приложение А. Краткая инструкция по применению	14

1 Наименование медицинского изделия

Емкость-контейнер многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов по ТУ 32.50.50-083-07511703-2022.

Варианты исполнения:

1. Емкость-контейнер многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов класса А, объемом 10,0; 21,0; 32,0 л, в составе:

- 1) Емкость-контейнер - 1 шт.;
- 2) Крышка – 1 шт.;
- 3) Этикетка маркировочная – 1 шт.;
- 4) Инструкция по применению - 1 шт.

2. Емкость-контейнер многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов класса Б, объемом 10,0; 21,0; 32,0 л, в составе:

- 1) Емкость-контейнер - 1 шт.;
- 2) Крышка – 1 шт.;
- 3) Этикетка маркировочная – 1 шт.;
- 4) Инструкция по применению - 1 шт.

3. Емкость-контейнер многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов класса В, объемом 10,0; 21,0; 32,0 л, в составе:

- 1) Емкость-контейнер - 1 шт.;
- 2) Крышка – 1 шт.;
- 3) Этикетка маркировочная – 1 шт.;
- 4) Инструкция по применению - 1 шт.

4. Емкость-контейнер многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов класса Г, объемом 10,0; 21,0; 32,0 л, в составе:

- 1) Емкость-контейнер - 1 шт.;
- 2) Крышка – 1 шт.;
- 3) Этикетка маркировочная – 1 шт.;
- 4) Инструкция по применению - 1 шт.

2 Сведения о разработчике и производителе медицинского изделия

Наименование: Акционерное общество «Новосибирский завод искусственного волокна» (АО «НЗИВ»).

Адрес: Россия, 633208, Новосибирская область, г. Искитим, Микрорайон Южный, 101.

3 Классификация

В зависимости от потенциального риска применения изделия, в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России № 4н от 06.06.2012 г. «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» и по ГОСТ 31508, медицинское изделие относится к классу – 1.

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 123680.

Вид контакта: Медицинское изделие не контактирует с пациентом. Медицинский персонал должен работать с медицинским изделием в перчатках.

Кратность применения: Медицинское изделие является многоразовым.

Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Изделия в зависимости от воспринимаемых механических воздействий относятся к группе 3 - носимые, переносные и передвижные, предназначенные для работы при переносках и передвижениях в пределах стационарного помещения.

4 Назначение

Емкости-контейнеры предназначены для безопасного сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов классов А, Б, В или Г.

5 Область применения

Емкости-контейнеры используются медицинским персоналом в реабилитационных, лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях.

6 Потенциальные потребители

Медицинские реабилитационные, лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения.

7 Показания к применению

Необходимость сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов классов А, Б, В или Г.

8 Противопоказания и возможные побочные действия

Противопоказаний и возможных побочных действий не выявлено.

9 Описание медицинского изделия

Емкости-контейнеры представляют собой пластиковые ведра с герметичными крышками, которые позволяют безопасно применять изделия по назначению.

10 Меры предосторожности

1. При работе следует соблюдать меры предосторожности.
2. Не использовать емкость-контейнер с механическими повреждениями.
3. При сборе и дальнейшем обращении с медицинскими отходами запрещается:
 - вручную разрушать, разрезать медицинские отходы классов Б, В и Г в целях их обеззараживания;
 - пересыпать (перегружать) неупакованные медицинские отходы классов Б, В и Г из одной емкости в другую;
 - утрамбовывать медицинские отходы классов Б, В и Г;
 - осуществлять любые манипуляции с медицинскими отходами и без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
 - устанавливать изделия на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов.
4. В случае получения работником при обращении с медицинскими отходами травмы (укол, порез с нарушением целостности кожных покровов и (или) слизистых), персоналу медицинской организации необходимо принять меры экстренной профилактики.
5. Запрещается работать с емкостью-контейнером без специальной защитной одежды и средств индивидуальной защиты.

11 Технические характеристики

Номинальный объем контейнера - 10,0; 21,0; 32,0 литров.

Допустимое отклонение от номинального значения не более 15%.

Габаритные размеры и масса соответствуют требованиям Таблицы 1 и Таблица 2.

Таблица 1. Масса изделия

Объем, л	Номинальная масса контейнера с ручкой, кг	Номинальная масса крышки, кг
10,0	0,333	0,080
21,0	0,681	0,146
32,0	0,963	0,206

Допустимое отклонение от номинального значения должно быть не более 15%.

Таблица 2. Габаритные характеристики

Объем, л	Диаметр DГ, мм	Диаметр дна DД, мм	Высота H1, мм	Диаметр крышки, D, мм	Высота H2, мм
10,0	294	256	223	289	15
21,0	332	280	335	330	18
32,0	418	320	388	380	18

Допустимое отклонение от номинального значения должно быть не более 15%.

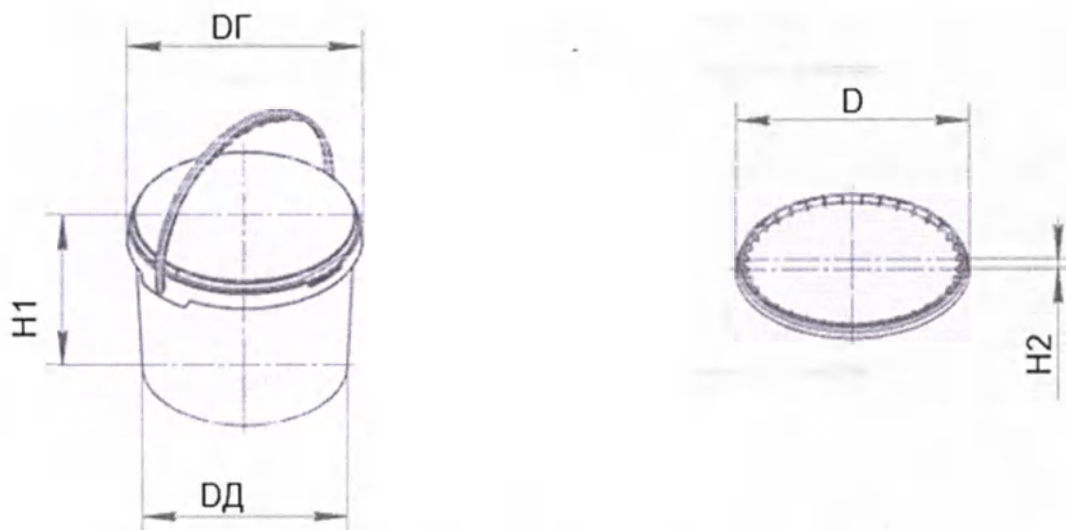


Рис.1. Габаритный чертеж контейнера

Вместимость емкостей-контейнеров соответствует таблице 3.

Таблица 3

Объем, л	Вместимость, кг
10,0	10,0
21,0	21,0
32,0	32,0

Допустимое отклонение от номинального значения должно быть не более 10 %.

Крепление емкости-контейнера должно выдерживать нагрузку, возникающую при заполнении контейнера водой или сыпучим материалом массой, равной грузоподъемности емкости-контейнера, указанной в таблице 3.

Цвет емкости-контейнера должен соответствовать классу опасности медицинских отходов, в соответствии с СанПиН 2.1.3684:

Класс А (белый) – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам (ТБО).

Класс Б (желтый) – эпидемиологически опасные отходы.

Класс В (красный) – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы.

Класс Г (черный) – токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности

Поверхности емкости-контейнеров многоразовых должны быть устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

12 Порядок работы с емкостью-контейнером многоразовым для сбора, хранения транспортирования медицинских отходов

1. На маркировочной этикетке емкости-контейнера (прикреплена на корпусе емкости-контейнера) заполните графы: «ЛПУ _____», «Дата сбора отходов _____», «Отходы собрал _____ / _____».

2. Вложите в емкость-контейнер пакет соответствующего размера и класса опасности, таким образом, чтобы края пакета загибались через края емкости-контейнера.

3. Емкость-контейнер готов к эксплуатации.

4. После заполнения одноразового пакета, находящегося в емкости-контейнере, примерно на три четверти, из него удаляется воздух и сотрудник, ответственный за сбор отходов, осуществляет его герметизацию.

5. Производить сбор медицинских отходов в течение 1 рабочей смены.

6. В конце рабочей смены, лицо, ответственное за сбор отходов, ставит емкость-контейнер на колесную опору и транспортирует отходы к месту их временного хранения на территории ЛПУ.

7. После разгрузки, емкость-контейнер необходимо помыть и продезинфицировать.

8. Дезинфекция производится ежедневно.

Дезинфекция проводится согласно МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644. Дезинфекция должна проводиться двукратной обработкой в течение 90 минут, при температуре 50°C.

После окончания дезинфекционной выдержки емкость-контейнер промывают проточной питьевой водой и оставляют просохнуть в течение 1 часа.

13 Комплект поставки

1. Емкость-контейнер многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов класса А, объемом 10,0; 21,0; 32,0 л, в составе:

- 1) Емкость-контейнер - 1 шт.;
- 2) Крышка – 1 шт.;
- 3) Этикетка маркировочная – 1 шт.;
- 4) Инструкция по применению - 1 шт.

2. Емкость-контейнер многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов класса Б, объёмом 10,0; 21,0; 32,0 л, в составе:

- 1) Емкость-контейнер - 1 шт.;
- 2) Крышка – 1 шт.;
- 3) Этикетка маркировочная – 1 шт.;
- 4) Инструкция по применению - 1 шт.

3. Емкость-контейнер многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов класса В, объёмом 10,0; 21,0; 32,0 л, в составе:

- 1) Емкость-контейнер - 1 шт.;
- 2) Крышка – 1 шт.;
- 3) Этикетка маркировочная – 1 шт.;
- 4) Инструкция по применению - 1 шт.

4. Емкость-контейнер многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов класса Г, объёмом 10,0; 21,0; 32,0 л, в составе:

- 1) Емкость-контейнер - 1 шт.;
- 2) Крышка – 1 шт.;
- 3) Этикетка маркировочная – 1 шт.;
- 4) Инструкция по применению - 1 шт.

В комплект поставки входит краткая версия инструкции по применению

14 Маркировка медицинского изделия

Каждая маркировочная этикетка содержит следующую информацию:

- наименование и/или товарный знак предприятия, адрес и контактные данные;
- наименование емкости-контейнера;
- объем емкости-контейнера;
- номер технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- номер партии;
- класс опасности отходов;
- обозначение медицинского учреждения;
- дата сбора отходов и ФИО ответственного за сбор;
- символ «Нестерильно». Указывает, что изделие не подвергалось стерилизации.

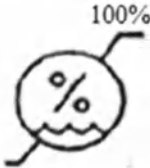
Информация, указанная на маркировке, может быть представлена как в виде текста, так и в виде символов согласно ГОСТ Р ИСО 1522-1.

Маркировка транспортной упаковки контейнера согласно ГОСТ 14192 содержит следующую информацию:

- наименование и/или товарный знак предприятия, адрес и контактные данные;
- наименование емкости-контейнера;
- объем емкости-контейнера;
- номер технических условий;
- номер и дата регистрационного досье;
- номер партии;
- состав изделия;
- класс опасности отходов;
- символ «Беречь от влаги»;
- символ «Хрупкое, осторожно!»;
- символ «Беречь от солнечных лучей»;
- символ «Диапазон влажности при транспортировании», значения указаны в процентах.
- символ «Температурный диапазон при транспортировании», значения указаны в градусах Цельсия.

Таблица 4. Обозначение символов

Условное обозначение	Расшифровка
	Нестерильно. Указывает, что изделие не подвергалось стерилизации.
	Беречь от влаги
	Хрупкое, осторожно!
	Беречь от солнечных лучей
	Штабелировать запрещено

	Температурный диапазон при транспортировании
	Диапазон влажности при транспортировании

15 Перечень применяемых производителем медицинского изделия национальных стандартов

ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов.

ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условий эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ Р 52901-2007. Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия.

ГОСТ 20477-86. Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия.

ГОСТ 31508-2012. Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования.

ГОСТ 15223-1-2020. Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.

ГОСТ 177-88. Водорода перекись. Технические условия.

ГОСТ 25644-96. Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования.

16 Очистка и дезинфекция

Емкость-контейнер многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов классов А, Б, В, Г устойчив к дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

17 Стерилизация

Медицинское изделие не подвергается стерилизации и не стерилизуется перед применением.

Изделие многократного применения.

18 Техническое обслуживание и ремонтпригодность

Емкость-контейнер не подлежит техническому обслуживанию и ремонту. Техническое обслуживание емкостей-контейнеров сводится к их профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений изделий, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов в изделиях, емкости-контейнеры считаются бракованными, и подлежат утилизации.

19 Условия эксплуатации, хранения и транспортирования

Емкость-контейнер применяется при следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от +10 °С до + 35 °С;
- влажность окружающего воздуха до 80 %, при температуре плюс 25 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

Емкость-контейнер транспортируется всеми видами крытого транспорта, кроме неотапливаемых отсеков самолетов и морского транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Размещение и крепление упаковок с емкостями-контейнерами в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования емкости-контейнера – по условиям хранения пункта 5 по ГОСТ 15150-69:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С;
- влажность окружающего воздуха до 100 %, при температуре плюс 25 °С.

Условия хранения емкости-контейнера – по условиям хранения пункта 2 по ГОСТ 15150-69:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С;
- влажность окружающего воздуха не более 98%, при температуре +25 °С.

Хранение изделий в местах с прямым попаданием солнечных лучей, а также в одном помещении с летучими, едкими веществами, вызывающими разрушение изделий, не допускается.

Изделия следует хранить на складах. Необходимо размещать изделия на стеллажах в один ряд.

20 Утилизация медицинского изделия

Емкость-контейнер подлежит утилизации (уничтожению) в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.3684 в зависимости от класса собранных в них отходов.

Емкость-контейнер, не поступивший в эксплуатацию, по истечении срока хранения подлежит вторичной переработке, либо подлежит утилизации (уничтожению) как твёрдые бытовые отходы класса А в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684.

В процессе изготовления Емкости-контейнера исключена возможность загрязнения окружающей среды отходами производства. Отходы, образующиеся при производстве продукции, утилизируются или перерабатываются во вторичное сырьё на предприятии.

При транспортировании, хранении, эксплуатации и утилизации Емкость-контейнер не наносит вред окружающей среде и не требует специальных мер защиты окружающей среды.

Описание способов утилизации отходов классов А, Б, В, Г.

1. Отходы класса А, кроме пищевых, могут удаляться из структурных подразделений с помощью мусоропровода или пневмотранспорта. Не допускается сброс в мусоропровод предметов, которые могут привести к механическому перекрытию (засору) ствола мусоропровода. Сброс отходов в мусоропровод должен осуществляться в упакованном виде.

2. Отходы класса Б подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции)/обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/обезвреживания определяется возможностями организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, и выполняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами.

В случае отсутствия в организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, участка по обеззараживанию/обезвреживанию отходов класса Б или централизованной системы обезвреживания медицинских отходов, принятой на административной территории, отходы класса Б обеззараживаются.

3. Отходы класса В подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции) физическими методами (термические, микроволновые, радиационные и другие).

Применение химических методов дезинфекции допускается только для обеззараживания пищевых отходов и выделений больных, а также при организации первичных противоэпидемических мероприятий в очагах. Выбор метода обеззараживания (дезинфекции) осуществляется при разработке схемы сбора и удаления отходов. Вывоз необеззараженных отходов класса В за пределы территории организации не допускается.

4. Вывоз отходов класса Г для обезвреживания или утилизации осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

21. Информация о сроке службы и сроке хранения

Срок службы многоразовых емкостей-контейнеров – 5 лет с даты его изготовления.

Дальнейшая эксплуатация невозможна, при появлении трещин, сколов, коррозии на ручке, а также при невозможности герметичного закрытия крышки.

Срок хранения многоразовых емкостей-контейнеров – 6 месяцев со дня продажи.

22. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие емкости-контейнера требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Гарантийный срок службы - 12 месяцев со дня начала эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня продажи.

23. Рекламации

В случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться по указанному адресу.

Наименование: Акционерное общество «Новосибирский завод искусственного волокна» (АО «НЗИВ»).

Адрес: Россия, 633208, Новосибирская область, г. Искитим, Микрорайон Южный, 101.

Приложение А. Краткая инструкция по применению

Наименование

Емкость-контейнер многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов по ТУ 32.50.50-083-07511703-2022.

Варианты исполнения:

1. Емкость-контейнер многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов класса А, объёмом 10,0; 21,0; 32,0 л, в составе:

- 1) Емкость-контейнер - 1 шт.;
- 2) Крышка – 1 шт.;
- 3) Этикетка маркировочная – 1 шт.;
- 4) Инструкция по применению - 1 шт.

2. Емкость-контейнер многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов класса Б, объёмом 10,0; 21,0; 32,0 л, в составе:

- 1) Емкость-контейнер - 1 шт.;
- 2) Крышка – 1 шт.;
- 3) Этикетка маркировочная – 1 шт.;
- 4) Инструкция по применению - 1 шт.

3. Емкость-контейнер многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов класса В, объёмом 10,0; 21,0; 32,0 л, в составе:

- 1) Емкость-контейнер - 1 шт.;
- 2) Крышка – 1 шт.;
- 3) Этикетка маркировочная – 1 шт.;
- 4) Инструкция по применению - 1 шт.

4. Емкость-контейнер многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов класса Г, объёмом 10,0; 21,0; 32,0 л, в составе:

- 1) Емкость-контейнер - 1 шт.;
- 2) Крышка – 1 шт.;
- 3) Этикетка маркировочная – 1 шт.;
- 4) Инструкция по применению - 1 шт.

Сведения о разработчике и производителе медицинского изделия

Наименование: Акционерное общество «Новосибирский завод искусственного волокна» (АО «НЗИВ»).

Адрес: Россия, 633208, Новосибирская область, г. Искитим, Микрорайон Южный, 101.

Назначение

Емкости-контейнеры предназначены для безопасного сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов классов А, Б, В, Г.

Область применения

Емкости-контейнеры используются медицинским персоналом в реабилитационных, лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях.

Потенциальные потребители

Медицинские реабилитационные, лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения.

Показания к применению

Необходимость сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов классов А, Б, В, Г.

Противопоказания и возможные побочные действия

Противопоказаний и возможных побочных действий не выявлено.

Описание медицинского изделия

Емкости-контейнеры представляют собой пластиковые ведра с герметичными крышками, которые позволяют безопасно применять изделия по назначению.

Меры предосторожности

1. При работе следует соблюдать меры предосторожности.
2. Не использовать емкость-контейнер с механическими повреждениями.
3. При сборе и дальнейшем обращении с медицинскими отходами запрещается:
 - вручную разрушать, разрезать медицинские отходы классов Б, В и Г, в целях их обеззараживания;
 - пересыпать (перегружать) неупакованные медицинские отходы классов Б, В и Г из одной емкости в другую;
 - утрамбовывать медицинские отходы классов Б, В и Г;
 - осуществлять любые манипуляции с медицинскими отходами и без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
 - устанавливать изделия на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов.
4. В случае получения работником при обращении с медицинскими отходами травмы (укол, порез с нарушением целостности кожных покровов и (или) слизистых), персоналу медицинской организации необходимо принять меры экстренной профилактики.
5. Запрещается работать с емкостью-контейнером без специальной защитной одежды и средств индивидуальной защиты.

Номинальный объем контейнера:

- 10,0; 21,0; 32,0 литров.

Габаритные размеры

Объем, д	Диаметр, мм	Диаметр дна, мм	Высота, мм	Диаметр крышки, мм	Высота, мм
10,0	294	256	223	289	15
21,0	332	280	335	330	18
32,0	418	320	388	380	18

Порядок работы с емкостью-контейнером многоразовым для сбора, хранения транспортирования медицинских отходов

1. На маркировочной этикетке емкости-контейнера (прикреплена на корпусе емкости-контейнера) заполните графы: «ЛПУ _____», «Дата сбора отходов _____», «Отходы собрал _____ / _____».
2. Вложите в емкость-контейнер пакет соответствующего размера и класса опасности, таким образом, чтобы края пакета загибались через края емкости-контейнера.
3. Емкость-контейнер готов к эксплуатации.
4. После заполнения одноразового пакета, находящегося в емкости-контейнере, примерно на три четверти, из него удаляется воздух и сотрудник, ответственный за сбор отходов, осуществляет его герметизацию.
5. Производить сбор медицинских отходов в течение 1 рабочей смены.
6. В конце рабочей смены, лицо, ответственное за сбор отходов, ставит емкость-контейнер на колесную опору и транспортирует отходы к месту их временного хранения на территории ЛПУ.
7. После разгрузки, емкость-контейнер необходимо помыть и продезинфицировать.
8. Дезинфекция производится ежедневно.

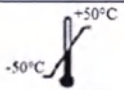
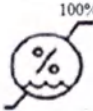
Дезинфекция проводится согласно МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5-процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644. Дезинфекция должна проводиться двукратной обработкой в течение 90 минут, при температуре 50°C.

После окончания дезинфекционной выдержки емкость-контейнер промывают проточной питьевой водой и оставляют просохнуть в течение 1 часа.

Маркировка

Таблица 2. Обозначение символов на маркировке

Условное обозначение	Расшифровка
	Нестерильно. Указывает, что изделие не подвергалось стерилизации.
	Беречь от влаги
	Хрупкое, осторожно!
	Беречь от солнечных лучей
	Штабелировать запрещено

	Температурный диапазон при транспортировании
	Диапазон влажности при транспортировании

Очистка и дезинфекция

Емкость-контейнер многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов классов А, Б, В, Г устойчив к дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5-процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

Условия эксплуатации и хранения

Емкость-контейнер применяется при следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С;
- влажность окружающего воздуха до 80 %, при температуре плюс 25 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

Условия хранения емкости-контейнера – по условиям хранения пункта 2 по ГОСТ 15150-69:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С;
- влажность окружающего воздуха не более 98%, при температуре +25 °С.

Хранение изделий в местах с прямым попаданием солнечных лучей, а также в одном помещении с летучими, едкими веществами, вызывающими разрушение изделий, не допускается.

Изделия следует хранить на складах. Необходимо размещать изделия на стеллажах в пять рядов.

Утилизация медицинского изделия

Емкость-контейнер подлежит утилизации (уничтожению) в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.3684 в зависимости от класса собранных в них отходов.

Емкость-контейнер, не поступивший в эксплуатацию, по истечении срока хранения подлежит вторичной переработке, либо подлежит утилизации (уничтожению) как твердые бытовые отходы класса А в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684.

В процессе изготовления Емкости-контейнера исключена возможность загрязнения окружающей среды отходами производства. Отходы, образующиеся при производстве продукции, утилизируются или перерабатываются во вторичное сырьё на предприятии.

При транспортировании, хранении, эксплуатации и утилизации Емкость-контейнер не наносит вред окружающей среде и не требует специальных мер защиты окружающей среды.

Информация о сроке службы и сроку хранения

Срок службы многоразовых емкостей-контейнеров – 5 лет с даты его изготовления.

Дальнейшая эксплуатация невозможна, при появлении трещин, сколов, коррозии на ручке, а также при невозможности герметичного закрытия крышки.

Срок хранения многоразовых емкостей-контейнеров – 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие емкости-контейнера требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Гарантийный срок службы - 12 месяцев со дня начала эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня продажи.

Рекламации

В случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться по указанному адресу.

Акционерное общество «Новосибирский завод искусственного волокна» (АО «НЗИВ»).

Адрес: Россия, 633208, Новосибирская область, г. Искитим, Микрорайон Южный, 101.

Полную версию эксплуатационной документации можно получить по электронной почте: e-mail: info@nziv.ru.

В данном документе прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

18 / Восемнадцать / листа (ов).

Генеральный директор

Г.Ю. Вареница



Handwritten signature: Г.Ю. Вареница