

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Валидус»



Павлов Р.Ю.

«07» ноября 2023 г.

М.П.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Набор медицинской мебели для оснащения кабинетов и лабораторий «Валидус» по ТУ 32.50.30-001-32924160-2023

(ВЛДС.942819.001.РЭ)

Ред.5.0

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с конструкцией и изучения правил эксплуатации на Набор медицинской мебели для оснащения кабинетов и лабораторий «Валидус» по ТУ 32.50.30-001-32924160-2023 (далее – набор мебели, мебель медицинская).

1. Область применения изделия

Набор медицинской мебели предназначен для оснащения различных медицинских кабинетов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах, больницах и лабораториях.

2. Эксплуатация изделия по назначению

Предназначен для размещения и хранения медикаментов, перевязочного материала, медицинской посуды, инструментов и прочих изделий медицинского назначения, а также для организации работы медицинского персонала (при проведении диагностики и лечения заболеваний и мониторинга состояния организма пациентов).

3. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделий может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

4. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно руководству по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

5. Меры предосторожности при применении изделия

5.1 Петли на дверях и направляющие на ящиках оснащены автоматическими доводчиками дверей, во избежание защемления пальцев рук рекомендуется дать двери и ящику закрыться без применения механической силы до конца.

5.2 При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери и полки необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с трещиной сопряжена с риском получения травмы. Убедитесь, что фасад из стекла не имеет повреждений.

5.3 Во избежание падения дверей: а) не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и иных подвижных частей. б) необходимо периодически (примерно 1 раз в год) подтягивать узлы резьбовых и эксцентриковых соединений.

5.4 Массу тела человека способны выдерживать только специально проектируемые для этого изделия (кушетки). Все прочие элементы- столешницы, полки, стенки и т.д. проектируются специально для хранения определённых изделий. Вставать ногами на изделия, нагружать их больше чем рассчитывалось при проектировании, запрещается.

5.5 Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками. Во избежание травмы со сломанными элементами изделия необходимо обращаться крайне осторожно.

5.6 При перемещении изделия следует освободить его от всего содержимого, держаться следует только за нижнюю несущую часть изделия. В противном случае есть риск отрыва столешницы от корпуса, что может привести к травме нижних конечностей пользователя.

5.7 При монтаже навесного шкафа необходимо использовать дюбель-гвоздь длиной не менее 60мм и монтировать его в кирпичную или бетонную стену. При монтаже шкафа на стену из гипоскартона, следует использовать специальный крепеж для данного материала. Так же категорически запрещается вешать навесной шкаф на стену из гипс-картона в один лист. При высокой нагрузке шкафа монтируемого на такой стене, имеется высокая вероятность поломки данного листа, что может привести к падению шкафа и соответственно к серьезным травмам пользователей или посетителей учреждения.

5.8 Следует помнить, что изделие имеет квадратные формы, а соответственно имеет углы. Во избежание получения травмы в виде ушиба, при эксплуатации не рекомендуется совершать резкие хаотичные движения. Все изделия имеющие углы имеют серый сигнальный цвет.

6. Варианты исполнения изделий набора

Набор медицинской мебели состоит из следующих видов (наименование и обозначение согласно таблицам 1-5 настоящего РЭ): шкафы, шкафы навесные, стеллажи, тумбы с мойкой, тумбы подкатные, тумбы стационарные, столы пеленальные, столы весовые, столики подкатные, кушетки, ширмы и выпускаются следующих сериях: Валидус-1; Валидус-2; Валидус-3, Валидус-4 и Валидус-5.

Внешний вид изделий представлен в Приложении 1 РЭ.

7. Классификация изделия:

Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

По последствиям отказа - к классу В по РД 50-707.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508.

8. Технические характеристики изделия.

8.1. Наименование, обозначение и характеристики изделий соответствуют таблицам 1-5 настоящего РЭ.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
Серия Валидус-1					
1.1	Тумбы подкатные	ТПКН	400х500х690	Ниша общая (1шт.) размер: 360х464х580мм, ниша верхняя(1шт.), ниша нижняя (1шт.) размер:360х464х286мм, полка (1шт.), размер:360х464мм, дверь (1шт.), размер:360х580мм, колесные опоры h70мм	20
		ТП-1КН	400х500х690	Ящик выдвижной размер(1шт.): 360х450х143мм, ниша общая (1шт.) размер: 360х464х433мм, ниша верхняя(1шт.), ниша нижняя(1шт.)размер:360х464х208,5мм, полка(1шт.)размер:360х464мм, дверь (1шт.) размер:360х433мм, колесные опоры h70мм	23
		ТП-2КН	400х500х690	Ящик выдвижной размер(2шт.): 360х450х143мм, ниша (1шт.) размер: 360х464х288мм, дверь (1шт.) размер:360х288мм, колесные опоры h70мм	28
		ТП-3КН	400х500х690	Ящик выдвижной размер(4шт.): 360х450х143мм, колесные опоры h70мм	34
		ТП-4КН	600х500х690	Ниша общая (1шт.) размер: 560х464х580мм, ниша верхняя(1шт.), ниша нижняя(1шт.) размер: 560х464х282мм, полка (1шт.), размер:560х464мм, дверь (1шт.), размер:560х580мм, колесные опоры h70мм	38
		ТП-5КН	600х500х690	Ящик выдвижной размер(1шт.): 560х450х143мм, ниша общая (1шт.) размер: 360х464х433мм, ниша	44

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
				верхняя(1шт.), ниша нижняя(1шт.)размер:360х464х208,5мм, полка(1шт.)размер:360х464мм, дверь (1шт.) размер:360х433мм, колесные опоры h70мм	
		ТП-6КН	600х500х690	Ящик выдвижной размер(3шт.): 560х450х288мм, колесные опоры h70мм	47
		ТП-7КН	600х500х690	Ящик выдвижной размер(4шт.): 560х450х143мм, колесные опоры h70мм	53
		ТП-8КН	900х500х690	Ниша общая (1шт.) размер: 860х464х580мм, ниша верхняя(1шт.), ниша нижняя(1шт.) размер: 860х464х282мм, полка (1шт.), размер:860х464мм, дверь (2шт.), размер:430х580мм, колесные опоры h70мм	58
		ТП-9КН	900х500х690	Ящик выдвижной размер(2шт.): 430х450х143мм, ниша общая (1шт.) размер: 860х464х433мм, ниша верхняя(1шт.), ниша нижняя(1шт.) размер:860х464х208,5мм, полка(1шт.) размер:860х464мм, дверь (2шт.) размер:430х433мм, колесные опоры h70мм	61
		ТП-10КН	900х500х690	Ящик выдвижной размер (3шт.): 860х450х288мм, колесные опоры h70мм	65
		ТП-11КН	900х500х690	Ящик выдвижной размер (4шт.): 860х450х143мм, колесные опоры h70мм	70
1.2	Шкафы	ШМКН	500х400х1900	Дверь размер (1шт) 460х1740мм, полки размер (4шт) 469х360мм, проем между полок размер (5шт) 335мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	37
		ШМСКН	500х400х1900	Дверь размер (1шт) 460х1740мм, полки размер (4шт) 469х360мм, проем между полок размер (5шт) 335мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	39
		ШМ-1КН	500х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (1шт) 460х860мм, дверь глухая (1шт) 460х860мм, полки размер (4шт) 469х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	40
		ШМ1-СФКН	500х400х1900	Дверь (2шт) 460х860мм, полки размер (4шт) 469х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	44
		ШМ-2КН	500х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (1шт) 460х860мм, ящики выдвижной размер (4шт) 460х450х143мм, полки размер (2шт) 469х360мм, проем между полок размер (3шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	52

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
		ШМ-3КН	500х400х1900	Дверь (1шт) 460х860мм, ящики выдвижной размер (4шт) 460х450х143мм, полки размер (2шт) 469х360мм, проем между полок размер (3шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	54
		ШМ-4КН	900х400х1900	Дверь размер (2шт) 430х1740мм, полки размер (5шт) 860х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	60
		ШМ-5КН	900х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме размер (2шт) 430х1740мм, полки размер (5шт) 860х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	63
		ШМ-6КН	900х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 430х860мм, дверь глухая (2шт) 430х860мм, полки размер (4шт) 840х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	66
		ШМ-7КН	900х400х1900	Дверь (4шт) 430х860мм, дверь глухая (2шт) 430х860мм, полки размер (4шт) 840х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	67
		ШМ-8КН	900х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 430х860мм, дверь глухая (1шт) 420х860мм, ящики выдвижной размер (4шт) 420х350х143мм, полки размер (2шт) 840х360мм, полки размер (2шт) 420х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	71
		ШМ-9КН	900х400х1900	Дверь (2шт) 430х860мм, дверь (1шт) 420х860мм, ящики выдвижной размер (4шт) 420х350х143мм, полки размер (2шт) 840х360мм, полки размер (2шт) 420х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	73
		ШМ-10КН	900х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 430х860мм, дверь глухая (2шт) 420х645мм, ящик выдвижной размер (2шт) 420х350х212мм, полки размер (2шт) 840х360мм, полки размер (2шт) 420х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	63
		ШМ-11КН	900х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 430х860мм, дверь (1шт) 420х645мм, ящик выдвижной размер (2шт) 420х350х430мм, полки размер (2шт) 840х360мм, полки размер	66

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
				(2шт) 420х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	
		ШМ-12КН	900х400х1900	Дверь (2шт) 430х860мм, дверь (1шт) 420х645, ящик выдвижной размер (2шт) 420х350х430мм, полки размер (2шт) 840х360мм, полки размер (2шт) 420х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	64
		ШМ-13КН	900х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 430х860мм, ящик выдвижной размер (4шт) 420х350х430мм, полки размер (2шт) 840х360мм, проем между полок размер (3шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	69
		ШМ-14КН	900х400х1900	Дверь (2шт) 430х860мм, ящик выдвижной размер (4шт) 420х350х430мм, полки размер (2шт) 840х360мм, проем между полок размер (3шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	71
		ШМУКН	650х650х1900	Дверь (1шт) 325х1740мм, полки размер (4шт) 610х610мм, проем между полок размер (5шт) 335мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	55
		ШМЭН-1КН	900х400х1900	Дверь размер (2шт) 430х1740мм, полка размер (1шт) 860х360мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	61
		ШК-1КН	900х500х1400	Ящик выдвижной размер (8шт) 417х450х312мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	72
		ШК-2КН	900х500х1400	Ящик выдвижной размер (16шт) 417х450х152мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	79
		ШК-3КН	450х500х1400	Ящик выдвижной размер (4шт) 410х450х312мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	52
		ШК-4КН	450х500х1400	Ящик выдвижной размер (8шт) 410х450х152мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	57
		ШМЛКН	900х500х1900	Дверь размер (2шт) 430х1740мм, полки размер (4шт) 860х460мм, проем между полок размер (5шт) 335мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	62
		ШМЛСКН	600х500х1900	Дверь размер (2шт) 560х1740мм, полки размер (4шт) 560х460мм, проем между полок размер (5шт) 335мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	67

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
1.3	Шкафы навесные	ШН-1КН	650х350х500	Дверь (2шт) 305х460мм, полка размер (1шт) 610х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	19
		ШН-1СКН	650х350х500	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 305х460мм, полка размер (1шт) 610х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	23
		ШН-2КН	700х350х500	Дверь (2шт) 320х460мм, полка размер (1шт) 660х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	25
		ШН-2СКН	700х350х500	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 320х460мм, полка размер (1шт) 660х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	27
		ШН-3КН	900х350х500	Дверь (2шт) 380х460мм, полка размер (1шт) 860х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	29
		ШН-3СКН	900х350х500	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 880х460мм, полка размер (1шт) 760х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	31
		ШН-4КН	1100х350х500	Дверь (2шт) 520х460мм, полка размер (2шт) 520х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	34
		ШН-4СКН	1100х350х500	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 520х460мм, полка размер (2шт) 520х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	37
		ШН-5КН	1200х350х500	Дверь (2шт) 570х460мм, полка размер (2шт) 570х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	39
		ШН-5СКН	1200х350х500	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 570х460мм, полка размер (2шт) 570х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	41
		ШНУ-1КН	650х650х500	Дверь (1шт) 325х460мм, полка размер (1шт) 610х610мм, проем между полок размер (2шт) 222мм	33
1.4	Тумбы стационарные	ТБ-1КН	600х650х900	Дверь размер (1шт) 550х724мм, полка размер (1шт) 550х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	21
		ТБ-2КН	600х650х900	Дверь размер (1шт) 550х558мм, ящик размер (1шт) 550х500х166мм, полка размер (1шт) 550х540мм, проем между полок размер (2шт) 270мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	24
		ТБ-3КН	600х650х900	Ящик размер (3шт) 550х500х240мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	29
		ТБ-4КН	600х650х900	Ящик размер (4шт) 550х500х181мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	30
		ТБ-5КН	900х650х900	Дверь размер (2шт) 425х724мм, полка размер (1шт) 850х540мм,	59

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
				проем между полок размер (2шт) 354мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	
		ТБ-6КН	900х650х900	Дверь размер (2шт) 425х558мм, ящик размер (2шт) 425х500х166мм, полка размер (1шт) 415х540мм, проем между полок размер (2шт) 270мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	63
		ТБ-7КН	900х650х900	Ящик размер (6шт) 425х500х240мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	69
		ТБ-8КН	1500х650х900	Ящик размер (8шт) 425х500х180мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	80
		ТБ-9КН	1500х650х900	Дверь размер (3шт) 470х724мм, полка размер (1шт) 470х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	84
		ТБ-10КН	1500х650х900	Дверь размер (3шт) 470х558мм, ящик размер (3шт) 470х500х166мм, полка размер (1шт) 70х540мм, проем между полок размер (2шт) 270мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	87
		ТБ-11КН	1500х650х900	Ящик размер (9шт) 470х500х240мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	89
		ТБУКН	950х950х900	Дверь размер (1шт) 388х724мм, полка размер (1шт) 855х855мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	64
1.5	Тумбы с мойкой	ТМ-1КН	600х650х900	Дверь размер (1шт) 550х724мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	37
		ТМ-2КН	900х650х900	Дверь размер (2шт) 425х724мм, раковина 2шт, смеситель 2шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	52
		ТМ-ЛКН	900х650х900	Дверь размер (1шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 330х724мм, полка размер (1шт) 330х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	55

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
		ТМ-ПКН	900х650х900	Дверь размер (1шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 330х724мм, полка размер (1шт) 330х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	55
		ТМ-1ПКН	900х650х900	Дверь размер (1шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 330х558мм, ящик выдвижной размер (1шт) 330х500х166мм, полка размер (1шт) 330х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	58
		ТМ-1ЛКН	900х650х900	Дверь размер (1шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 330х558мм, ящик выдвижной размер (1шт) 330х500х166мм, полка размер (1шт) 330х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	58
		ТМ-3ЛКН	900х650х900	Дверь размер (1шт) 500х724мм, ящик выдвижной размер (3шт) 330х500х240мм, полка размер (1шт) 330х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	60,5
		ТМ-3ПКН	900х650х900	Дверь размер (1шт) 500х724мм, ящик выдвижной размер (3шт) 330х500х240мм, полка размер (1шт) 330х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	60,5
		ТМ-4ПКН	1500х650х900	Дверь размер (2шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 410х724мм, полка размер (1шт) 410х540мм, полка размер (1шт) 500х540мм проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	63
		ТМ-4ЛКН	1500х650х900	Дверь размер (2шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 410х724мм, полка размер (1шт) 410х540мм, полка размер (1шт) 500х540мм проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с	63

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
				регулируемыми опорами размер 120мм.	
		ТМ-5ПКН	1500х650х900	Дверь размер (2шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 410х724мм, ящик выдвижной размер (3шт) 410х500х240мм, полка размер (1шт) 500х540мм проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	64
		ТМ-5ЛКН	1500х650х900	Дверь размер (2шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 410х724мм, ящик выдвижной размер (3шт) 410х500х240мм, полка размер (1шт) 500х540мм проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	64
		ТМ-6ПКН	1500х650х900	Дверь размер (2шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 410х724мм, ящик выдвижной размер (4шт) 410х500х180мм, полка размер (1шт) 500х540мм проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	67
		ТМ-6ЛКН	1500х650х900	Дверь размер (2шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 410х724мм, ящик выдвижной размер (4шт) 410х500х180мм, полка размер (1шт) 500х540мм проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	67
		ТМУ-1КН	950х950х900	Дверь размер (1шт) 420х724мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	52
1.6	Столики подкатные	СТКН	600х400х900	Ящик выдвижной размер (1шт) 560х350х120мм, проем между полок (1шт) 500мм, колеса диаметром 75мм.	11
		СТ-3КН	600х400х900	Ящик: отсутствует, проем между полок (2шт) 310мм, колеса диаметром 75мм.	13
		СТ-4КН	600х400х900	Ящик: отсутствует, проем между полок (2шт) 370мм, колеса диаметром 75мм.	16
1.7	Шкафы вытяжные	ШВ-1КН	1000х700х2200	Дверь кол-во и размер: отсутствует, подъемный экран: стекло в алюминиевой раме размер (1шт) 920х800мм, ножки: отсутствует.	133

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
		ШВ-2КН	1200х700х2200	Дверь размер (4шт) 285х580мм, подъемный экран: стекло в алюминиевой раме размер (1шт) 1120х800мм, ножки размер 120мм.	157
		ШВ-3КН	1500х700х2200	Дверь кол-во и размер: отсутствует, подъемный экран: стекло в алюминиевой раме размер (1шт) 1420х800мм, ножки: отсутствует.	162
		ШВ-4КН	1500х700х2200	Дверь размер (4шт) 360х580мм, подъемный экран: стекло в алюминиевой раме размер (1шт) 1120х800мм, ножки размер 120мм.	269
1.8	Стеллажи	СЛ-1КН	600х450х1900	Двери кол-во и размер: отсутствуют, проем между полок размер (5шт) 332мм, ножки с регулируемыми опорами h120мм.	22
		СЛ-2КН	800х450х1900	Двери кол-во и размер: отсутствуют, проем между полок размер (5шт) 332мм, ножки с регулируемыми опорами h120мм.	26
		СЛ-3КН	900х450х1900	Двери кол-во и размер: отсутствуют, проем между полок размер (5шт) 332мм, ножки с регулируемыми опорами h120мм.	28
1.9	Столы пеленальные	СП-1КН	1000х650х900	Двери кол-во и размер: отсутствуют, ниша размер (1шт) 330мм, ножки с регулируемыми опорами h120мм.	57
		СП-2КН	1000х650х900	Двери размер (2шт) 470х400, ниша размер (1шт) 250мм, ножки с регулируемыми опорами h120мм.	63
		СП-3КН	1000х650х900	Двери размер (2шт) 470х670, ниша размер: отсутствует, ножки с регулируемыми опорами h120мм.	67
1.10	Столы весовые	СВ-1КН	600х400х900	Бортик размер: отсутствует, регулируемые опоры: ± 20мм; ниша размер: отсутствует, двери кол-во и размер: отсутствуют.	89
		СВ-2КН	1200х600х900	Бортик размер: h70мм, регулируемые опоры: h120мм; ниша размер: отсутствует, двери кол-во и размер: отсутствуют.	143

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
Серия Валидус-2					
1.1	Столы пеленальные	СП-1К	1000х650х850	Двери кол-во и размер: отсутствуют, ниша размер (1шт) 330мм, ножки с регулируемыми опорами h120мм; колесные опоры диам. 75мм.	59
		СП-2К	1000х650х850	Двери размер (2шт) 470х400, ниша размер (1шт) 250мм, ножки с регулируемыми опорами h120мм; колесные опоры диам. 75мм.	62
		СП-3К	1000х650х850	Двери размер (2шт) 470х670, ниша размер: отсутствует, ножки с регулируемыми опорами h120мм; колесные опоры диам. 75мм.	64

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
1.2	Тумбы подкатные	ТПК	400х500х690	Ниша общая (1шт.) размер: 360х464х580мм, ниша верхняя(1шт.), ниша нижняя (1шт.) размер:360х464х286мм, полка (1шт.), размер:360х464мм, дверь (1шт.), размер:360х580мм, колесные опоры h70мм	24
		ТП-1К	400х500х670	Ящик выдвижной размер(1шт.): 360х450х143мм, ниша общая (1шт.) размер: 360х464х433мм, ниша верхняя(1шт.), ниша нижняя(1шт.)размер:360х464х208, 5мм,полка(1шт.)размер:360х464мм, дверь (1шт.) размер:360х433мм, колесные опоры h70мм	26,5
		ТП-2К	400х500х690	Ящик выдвижной размер(2шт.): 360х450х143мм, ниша (1шт.) размер: 360х464х288мм, дверь (1шт.) размер:360х288мм, колесные опоры h70мм	29
		ТП-3К	400х500х690	Ящик выдвижной размер(4шт.): 360х450х143мм, колесные опоры h70мм.	35
		ТП-4К	600х500х690	Ниша общая (1шт.) размер: 560х464х580мм, ниша верхняя(1шт.), ниша нижняя(1шт.) размер: 560х464х282мм, полка (1шт.), размер:560х464мм, дверь (1шт.), размер:560х580мм, колесные опоры h70мм.	31
		ТП-5К	600х500х690	Ящик выдвижной размер(1шт.): 560х450х143мм, ниша общая (1шт.) размер: 360х464х433мм, ниша верхняя(1шт.), ниша нижняя(1шт.)размер:360х464х208, 5мм,полка(1шт.)размер:360х464мм, дверь (1шт.) размер:360х433мм, колесные опоры h70мм	33,5
		ТП-6К	600х500х690	Ящик выдвижной размер(3шт.): 560х450х288мм, колесные опоры h70мм	38
		ТП-7К	600х500х690	Ящик выдвижной размер(4шт.): 560х450х143мм, колесные опоры h70мм	41
		ТП-8К	900х500х690	Ниша общая (1шт.) размер: 860х464х580мм, ниша верхняя(1шт.), ниша нижняя(1шт.) размер: 860х464х282мм, полка (1шт.), размер:860х464мм, дверь (2шт.), размер:430х580мм, колесные опоры h70мм	40
		ТП-9К	900х500х690	Ящик выдвижной размер(2шт.): 430х450х143мм, ниша общая (1шт.) размер: 860х464х433мм, ниша верхняя(1шт.), ниша нижняя(1шт) размер:860х464х208,5мм, полка(1шт.) размер:860х464мм, дверь (2шт.) размер:430х433мм, колесные опоры h70мм	45

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
		ТП-10К	900х500х690	Ящик выдвижной размер (3шт.): 860х450х288мм, колесные опоры h70мм	50
		ТП-11К	900х500х690	Ящик выдвижной размер (4шт.): 860х450х143мм, колесные опоры h70мм	54
		ТПБ-1К	400х500х900	Дверь размер (1шт) 356х460мм, ящик выдвижной размер (1шт) 356х450х120мм, полка размер (1шт) 360х460мм, проем между полок (2шт) 220мм, колеса диаметром 75мм.	42
		ТПБ-2К	400х500х900	Дверь размер (1шт) 356х460мм, ящик выдвижной размер (1шт) 356х450х120мм, полка размер (1шт) 360х460мм, проем между полок (2шт) 220мм, колеса диаметром 75мм.	40
1.3	Шкафы	ШМК	500х400х1900	Дверь размер (1шт) 460х1740мм, полки размер (4шт) 469х360мм, проем между полок размер (5шт) 335мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм, колеса диаметром 75мм.	45
		ШМСК	500х400х1900	Дверь размер (1шт) 460х1740мм, полки размер (4шт) 469х360мм, проем между полок размер (5шт) 335мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм, колеса диаметром 75мм.	52
		ШМ-1К	500х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (1шт) 460х860мм, дверь глухая (1шт) 460х860мм, полки размер (4шт) 469х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм, колеса диаметром 75мм.	51
		ШМ1-СФК	500х400х1900	Дверь (2шт) 460х860мм, полки размер (4шт) 469х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм, колеса диаметром 75мм.	49
		ШМ-2К	500х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (1шт) 460х860мм, ящики выдвижной размер (4шт) 460х450х143мм, полки размер (2шт) 469х360мм, проем между полок размер (3шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм, колеса диаметром 75мм.	57,5
		ШМ-3К	500х400х1900	Дверь (1шт) 460х860мм, ящики выдвижной размер (4шт) 460х450х143мм, полки размер (2шт) 469х360мм, проем между полок размер (3шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм, колеса диаметром 75мм.	59
		ШМ-4К	900х400х1900	Дверь размер (2шт) 430х1740мм, полки размер (5шт) 860х360мм, проем между полок размер (6шт)	80

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
				276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм, колеса диаметром 75мм.	
		ШМ-5К	900х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме размер (2шт) 430х1740мм, полки размер (5шт) 860х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	84
		ШМ-6К	900х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 430х860мм, дверь глухая (2шт) 430х860мм, полки размер (4шт) 840х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	88
		ШМ-7К	900х400х1900	Дверь (4шт) 430х860мм, дверь глухая (2шт) 430х860мм, полки размер (4шт) 840х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	82
		ШМ-8К	900х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 430х860мм, дверь глухая (1шт) 420х860мм, ящики выдвижной размер (4шт) 420х350х143мм, полки размер (2шт) 840х360мм, полки размер (2шт) 420х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	90
		ШМ-9К	900х400х1900	Дверь (2шт) 430х860мм, дверь (1шт) 420х860мм, ящики выдвижной размер (4шт) 420х350х143мм, полки размер (2шт) 840х360мм, полки размер (2шт) 420х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	93
		ШМ-10К	900х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 430х860мм, дверь глухая (2шт) 420х645мм, ящик выдвижной размер (2шт) 420х350х212мм, полки размер (2шт) 840х360мм, полки размер (2шт) 420х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	87
		ШМ-11К	900х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 430х860мм, дверь (1шт) 420х645мм, ящик выдвижной размер (2шт) 420х350х430мм, полки размер (2шт) 840х360мм, полки размер (2шт) 420х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми	93

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
				опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	
		ШМ-12К	900х400х1900	Дверь (2шт) 430х860мм, дверь (1шт) 420х645, ящик выдвижной размер (2шт) 420х350х430мм, полки размер (2шт) 840х360мм, полки размер (2шт) 420х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	90
		ШМ-13К	900х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 430х860мм, ящик выдвижной размер (4шт) 420х350х430мм, полки размер (2шт) 840х360мм, проем между полок размер (3шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	92
		ШМ-14К	900х400х1900	Дверь (2шт) 430х860мм, ящик выдвижной размер (4шт) 420х350х430мм, полки размер (2шт) 840х360мм, проем между полок размер (3шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	87
		ШО-1К	600х400х1900	Дверь размер (1шт) 560х1740мм, полка для головных уборов размер (1шт) 560х360мм, полка размер (1шт) 560х250мм, штанга для плечиков выдвижная, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	54
		ШК-1К	900х500х1400	Ящик выдвижной размер (8шт) 417х450х312мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	125
		ШК-2К	900х500х1400	Ящик выдвижной размер (16шт) 417х450х152мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	140
		ШК-3К	450х500х1400	Ящик выдвижной размер (4шт) 410х450х312мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	68
		ШК-4К	450х500х1400	Ящик выдвижной размер (8шт) 410х450х152мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	110
		ШН-1К	650х350х500	Дверь (2шт) 305х460мм, полка размер (1шт) 610х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	
		ШН-1СК	650х350х500	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 305х460мм, полка размер (1шт) 610х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	26
		ШН-2К	700х350х500	Дверь (2шт) 320х460мм, полка размер (1шт) 660х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	28
		ШН-2СК	700х350х500	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 320х460мм, полка размер	29

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
				(1шт) 660х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	
		ШН-3К	900х350х500	Дверь (2шт) 380х460мм, полка размер (1шт) 860х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	29
		ШН-3СК	900х350х500	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 880х460мм, полка размер (1шт) 760х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	32
		ШН-4К	1100х350х500	Дверь (2шт) 520х460мм, полка размер (2шт) 520х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	39
		ШН-4СК	1100х350х500	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 520х460мм, полка размер (2шт) 520х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	41
		ШН-5К	1200х350х500	Дверь (2шт) 570х460мм, полка размер (2шт) 570х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	43
		ШН-5СК	1200х350х500	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 570х460мм, полка размер (2шт) 570х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	45
		ШНУ-1К	650х650х500	Дверь (1шт) 325х460мм, полка размер (1шт) 610х610мм, проем между полок размер (2шт) 222мм	38
1.4	Тумбы стационарные	ТБ-1К	600х600х850	Дверь размер (1шт) 550х724мм, полка размер (1шт) 550х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	36
		ТБ-2К	600х600х850	Дверь размер (1шт) 550х558мм, ящик размер (1шт) 550х500х166мм, полка размер (1шт) 550х540мм, проем между полок размер (2шт) 270мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	46
		ТБ-3К	600х600х850	Ящик размер (3шт) 550х500х240мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	54
		ТБ-4К	900х600х850	Ящик размер (4шт) 550х500х181мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	72
		ТБ-5К	900х600х850	Дверь размер (2шт) 425х724мм, полка размер (1шт) 850х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	79
		ТБ-6К	900х600х850	Дверь размер (2шт) 425х558мм, ящик размер (2шт) 425х500х166мм, полка размер	82

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
				(1 шт) 415х540мм, проем между полок размер (2 шт) 270мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	
		ТБ-7К	900х600х850	Ящик размер (6 шт) 425х500х240мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	78
		ТБ-8К	1500х600х850	Ящик размер (8 шт) 425х500х180мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	107
		ТБ-9К	1500х600х850	Дверь размер (3 шт) 470х724мм, полка размер (1 шт) 470х540мм, проем между полок размер (2 шт) 354мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	114
		ТБ-10К	1500х600х850	Дверь размер (3 шт) 470х558мм, ящик размер (3 шт) 470х500х166мм, полка размер (1 шт) 70х540мм, проем между полок размер (2 шт) 270мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	119
		ТБ-11К	1500х600х850	Ящик размер (9 шт) 470х500х240мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	121
		ТБУК	950х950х850	Дверь размер (1 шт) 388х724мм, полка размер (1 шт) 855х855мм, проем между полок размер (2 шт) 354мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	98
		ТМ-1К	600х600х850	Дверь размер (1 шт) 550х724мм, раковина 1 шт, смеситель 1 шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	35
		ТМ-2К	900х600х850	Дверь размер (2 шт) 425х724мм, раковина 2 шт, смеситель 2 шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	42
		ТМ-ЛК	900х600х850	Дверь размер (1 шт) 500х724мм, дверь размер (1 шт) 330х724мм, полка размер (1 шт) 330х540мм, проем между полок размер (2 шт) 354мм, раковина 1 шт, смеситель 1 шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	47

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
		ТМ-ПК	900х600х850	Дверь размер (1шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 330х724мм, полка размер (1шт) 330х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	47
		ТМ-1ПК	900х600х850	Дверь размер (1шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 330х558мм, ящик выдвижной размер (1шт) 330х500х166мм, полка размер (1шт) 330х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	52
		ТМ-1ЛК	900х600х850	Дверь размер (1шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 330х558мм, ящик выдвижной размер (1шт) 330х500х166мм, полка размер (1шт) 330х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	49
		ТМ-3ЛК	900х600х850	Дверь размер (1шт) 500х724мм, ящик выдвижной размер (3шт) 330х500х240мм, полка размер (1шт) 330х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	51
		ТМ-3ПК	900х600х850	Дверь размер (1шт) 500х724мм, ящик выдвижной размер (3шт) 330х500х240мм, полка размер (1шт) 330х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	52
		ТМ-4ПК	1500х600х850	Дверь размер (2шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 410х724мм, полка размер (1шт) 410х540мм, полка размер (1шт) 500х540мм проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	108
		ТМ-4ЛК	1500х600х850	Дверь размер (2шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 410х724мм, полка размер (1шт) 410х540мм, полка размер (1шт) 500х540мм проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель	115

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
				1 шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	
		ТМ-5ПК	1500х600х850	Дверь размер (2шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 410х724мм, ящик выдвижной размер (3шт) 410х500х240мм, полка размер (1шт) 500х540мм проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	117,5
		ТМ-5ЛК	1500х600х850	Дверь размер (2шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 410х724мм, ящик выдвижной размер (3шт) 410х500х240мм, полка размер (1шт) 500х540мм проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	114
		ТМ-6ПК	1500х600х850	Дверь размер (2шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 410х724мм, ящик выдвижной размер (4шт) 410х500х180мм, полка размер (1шт) 500х540мм проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	115
		ТМ-6ЛК	1500х600х850	Дверь размер (2шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 410х724мм, ящик выдвижной размер (4шт) 410х500х180мм, полка размер (1шт) 500х540мм проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	117
		ТМУ-1К	950х950х850	Дверь размер (1шт) 420х724мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм; колеса диаметром 75мм.	67

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
Серия Валидус-3					
1.1	Столы пеленальные	СП-1КВ	1000х650х850	Двери кол-во и размер: отсутствуют, ниша размер (1шт) 330мм, ножки с регулируемыми опорами h120мм.	59
		СП-2КВ	1000х650х850	Двери размер (2шт) 470х400, ниша размер (1шт) 250мм, ножки	62

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
				с регулирующими опорами h120мм.	
		СП-3КВ	1000х650х850	Двери размер (2шт.) 470х670, ниша размер: отсутствует, ножки с регулирующими опорами h120мм.	64
1.2	Тумбы подкатные	ТПКВ	400х500х690	Ниша общая (1шт.) размер: 360х464х580мм, ниша верхняя(1шт.), ниша нижняя (1шт.) размер:360х464х286мм, полка (1шт.), размер:360х464мм, дверь (1шт.), размер:360х580мм, колесные опоры h70мм	24
		ТП-1КВ	400х500х690	Ящик выдвижной размер(1шт.): 360х450х143мм, ниша общая (1шт.) размер: 360х464х433мм, ниша верхняя(1шт.), ниша нижняя(1шт.)размер:360х464х20 8,5мм,полка(1шт.)размер:360х46 4мм, дверь (1шт.) размер:360х433мм, колесные опоры h70мм	26,5
		ТП-2КВ	400х500х690	Ящик выдвижной размер(2шт.): 360х450х143мм, ниша (1шт.) размер: 360х464х288мм, дверь (1шт.) размер:360х288мм, колесные опоры h70мм	29
		ТП-3КВ	400х500х690	Ящик выдвижной размер(4шт.): 360х450х143мм, колесные опоры h70мм.	35
		ТП-4КВ	600х500х690	Ниша общая (1шт.) размер: 560х464х580мм, ниша верхняя(1шт.), ниша нижняя(1шт.) размер: 560х464х282мм, полка (1шт.), размер:560х464мм, дверь (1шт.), размер:560х580мм, колесные опоры h70мм.	31
		ТП-5КВ	600х500х690	Ящик выдвижной размер(1шт.): 560х450х143мм, ниша общая (1шт.) размер: 360х464х433мм, ниша верхняя(1шт.), ниша нижняя(1шт.)размер:360х464х20 8,5мм,полка(1шт.)размер:360х46 4мм, дверь (1шт.) размер:360х433мм, колесные опоры h70мм	33,5
		ТП-6КВ	600х500х690	Ящик выдвижной размер(3шт.): 560х450х288мм, колесные опоры h70мм	38
		ТП-7КВ	600х500х690	Ящик выдвижной размер(4шт.): 560х450х143мм, колесные опоры h70мм	41
		ТП-8КВ	900х500х690	Ниша общая (1шт.) размер: 860х464х580мм, ниша верхняя(1шт.), ниша нижняя(1шт.) размер: 860х464х282мм, полка (1шт.), размер:860х464мм, дверь (2шт.), размер:430х580мм, колесные опоры h70мм	40

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
		ТП-9КВ	900х500х690	Ящик выдвижной размер(2шт.): 430х450х143мм, ниша общая (1шт.) размер: 860х464х433мм, ниша верхняя(1шт.), ниша нижняя(1шт) размер:860х464х208,5мм, полка(1шт.) размер:860х464мм, дверь (2шт.) размер:430х433мм, колесные опоры h70мм	45
		ТП-10КВ	900х500х690	Ящик выдвижной размер (3шт.): 860х450х288мм, колесные опоры h70мм	50
		ТП-11КВ	900х500х690	Ящик выдвижной размер (4шт.): 860х450х143мм, колесные опоры h70мм	54
		ТПБ-1КВ	400х500х900	Дверь размер (1шт) 356х460мм, ящик выдвижной размер (1шт) 356х450х120мм, полка размер (1шт) 360х460мм, проем между полок (2шт) 220мм, колеса диаметром 75мм.	42
		ТПБ-2КВ	400х500х900	Дверь размер (1шт) 356х460мм, ящик выдвижной размер (1шт) 356х450х120мм, полка размер (1шт) 360х460мм, проем между полок (2шт) 220мм, колеса диаметром 75мм.	40
1.3	Шкафы	ШМКВ	500х400х1900	Дверь размер (1шт) 460х1740мм, полки размер (4шт) 469х360мм, проем между полок размер (5шт) 355мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	45
		ШМСКВ	500х400х1900	Дверь размер (1шт) 460х1740мм, полки размер (4шт) 469х360мм, проем между полок размер (5шт) 335мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	52
		ШМ-1КВ	500х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (1шт) 460х860мм, дверь глухая (1шт) 460х860мм, полки размер (4шт) 469х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	51
		ШМ1-СФКВ	500х400х1900	Дверь (2шт) 460х860мм, полки размер (4шт) 469х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	49
		ШМ-2КВ	500х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (1шт) 460х860мм, ящики выдвижной размер (4шт) 460х450х143мм, полки размер (2шт) 469х360мм, проем между полок размер (3шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	57,5
		ШМ-3КВ	500х400х1900	Дверь (1шт) 460х860мм, ящики выдвижной размер (4шт) 460х450х143мм, полки размер (2шт) 469х360мм, проем между полок размер (3шт) 276мм,	59

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
				ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	
		ШМ-4КВ	900х400х1900	Дверь размер (2шт) 430х1740мм, полки размер (5шт) 860х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	80
		ШМ-5КВ	900х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме размер (2шт) 430х1740мм, полки размер (5шт) 860х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	84
		ШМ-6КВ	900х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 430х860мм, дверь глухая (2шт) 430х860мм, полки размер (4шт) 840х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	88
		ШМ-7КВ	900х400х1900	Дверь (4шт) 430х860мм, дверь глухая (2шт) 430х860мм, полки размер (4шт) 840х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	82
		ШМ-8КВ	900х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 430х860мм, дверь глухая (1шт) 420х860мм, ящики выдвижной размер (4шт) 420х350х143мм, полки размер (2шт) 840х360мм, полки размер (2шт) 420х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	90
		ШМ-9КВ	900х400х1900	Дверь (2шт) 430х860мм, дверь (1шт) 420х860мм, ящики выдвижной размер (4шт) 420х350х143мм, полки размер (2шт) 840х360мм, полки размер (2шт) 420х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	93
		ШМ-10КВ	900х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 430х860мм, дверь глухая (2шт) 420х645мм, ящик выдвижной размер (2шт) 420х350х212мм, полки размер (2шт) 840х360мм, полки размер (2шт) 420х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	87
		ШМ-11КВ	900х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 430х860мм, дверь (1шт) 420х645мм, ящик выдвижной размер (2шт) 420х350х430мм, полки размер (2шт) 840х360мм, полки размер (2шт) 420х360мм, проем между	93

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
				полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	
		ШМ-12КВ	900х400х1900	Дверь (2шт) 430х860мм, дверь (1шт) 420х645, ящик выдвижной размер (2шт) 420х350х430мм, полки размер (2шт) 840х360мм, полки размер (2шт) 420х360мм, проем между полок размер (6шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	90
		ШМ-13КВ	900х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 430х860мм, ящик выдвижной размер (4шт) 420х350х430мм, полки размер (2шт) 840х360мм, проем между полок размер (3шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	92
		ШМ-14КВ	900х400х1900	Дверь (2шт) 430х860мм, ящик выдвижной размер (4шт) 420х350х430мм, полки размер (2шт) 840х360мм, проем между полок размер (3шт) 276мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	87
		ШО-1КВ	600х400х1900	Дверь размер (1шт) 560х1740мм, полка для головных уборов размер (1шт) 560х360мм, полка размер (1шт) 560х250мм, штанга для плечиков выдвижная, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	54
		ШК-1КВ	900х500х1400	Ящик выдвижной размер (8шт) 417х450х312мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	125
		ШК-2КВ	900х500х1400	Ящик выдвижной размер (16шт) 417х450х152мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	140
		ШК-3КВ	450х500х1400	Ящик выдвижной размер (4шт) 410х450х312мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	68
		ШК-4КВ	450х500х1400	Ящик выдвижной размер (8шт) 410х450х152мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	110
		ШН-1СКВ	650х350х500	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 305х460мм, полка размер (1шт) 610х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	26
		ШН-2КВ	700х350х500	Дверь (2шт) 320х460мм, полка размер (1шт) 660х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	28
		ШН-2СКВ	700х350х500	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 320х460мм, полка размер (1шт) 660х310мм, проем	29

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
				между полок размер (2шт) 222мм.	
		ШН-3КВ	900х350х500	Дверь (2шт) 305х460мм, полка размер (1шт) 610х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	29
		ШН-3СКВ	900х350х500	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 305х460мм, полка размер (1шт) 610х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	32
		ШН-4КВ	1100х350х500	Дверь (2шт) 320х460мм, полка размер (1шт) 660х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	39
		ШН-4СКВ	1100х350х500	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 320х460мм, полка размер (1шт) 660х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	41
		ШН-5КВ	1200х350х500	Дверь (2шт) 570х460мм, полка размер (2шт) 570х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	43
		ШН-5СК	1200х350х500	Дверь стекло в алюминиевой раме (2шт) 570х460мм, полка размер (2шт) 570х310мм, проем между полок размер (2шт) 222мм.	45
		ШНУ-1КВ	650х650х500	Дверь (1шт) 325х460мм, полка размер (1шт) 610х610мм, проем между полок размер (2шт) 222мм	38
1.4	Тумбы стационарные	ТБ-1КВ	600х600х850	Дверь размер (1шт) 550х724мм, полка размер (1шт) 550х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	36
		ТБ-2КВ	600х600х850	Дверь размер (1шт) 550х558мм, ящик размер (1шт) 550х500х166мм, полка размер (1шт) 550х540мм, проем между полок размер (2шт) 270мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	46
		ТБ-3КВ	600х600х850	Ящик размер (3шт) 550х500х240мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	54
		ТБ-4КВ	900х600х850	Ящик размер (4шт) 550х500х181мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	72
		ТБ-5КВ	900х600х850	Дверь размер (2шт) 425х724мм, полка размер (1шт) 850х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, бортик размер:h70мм,	79

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
				ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	
		ТБ-6КВ	900х600х850	Дверь размер (2шт) 425х558мм, ящик размер (2шт) 425х500х166мм, полка размер (1шт) 415х540мм, проем между полок размер (2шт) 270мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	82
		ТБ-7КВ	900х600х850	Ящик размер (6шт) 425х500х240мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	78
		ТБ-8КВ	1500х600х850	Ящик размер (8шт) 425х500х180мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	107
		ТБ-9КВ	1500х600х850	Дверь размер (3шт) 470х724мм, полка размер (1шт) 470х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	114
		ТБ-10КВ	1500х600х850	Дверь размер (3шт) 470х558мм, ящик размер (3шт) 470х500х166мм, полка размер (1шт) 70х540мм, проем между полок размер (2шт) 270мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	119
		ТБ-11КВ	1500х600х850	Ящик размер (9шт) 470х500х240мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	121
		ТБУКВ	950х950х850	Дверь размер (1шт) 388х724мм, полка размер (1шт) 855х855мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	98
		ТМ-1КВ	600х600х850	Дверь размер (1шт) 550х724мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	35
		ТМ-2КВ	900х600х850	Дверь размер (2шт) 425х724мм, раковина 2шт, смеситель 2шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	42
		ТМ-ЛКВ	900х600х850	Дверь размер (1шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 330х724мм, полка размер (1шт) 330х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм,	47

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
				ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	
		ТМ-ПКВ	900х600х850	Дверь размер (1шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 330х724мм, полка размер (1шт) 330х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	47
		ТМ-1ПКВ	900х600х850	Дверь размер (1шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 330х558мм, ящик выдвижной размер (1шт) 330х500х166мм, полка размер (1шт) 330х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	52
		ТМ-1ЛКВ	900х600х850	Дверь размер (1шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 330х558мм, ящик выдвижной размер (1шт) 330х500х166мм, полка размер (1шт) 330х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	49
		ТМ-3ЛКВ	900х600х850	Дверь размер (1шт) 500х724мм, ящик выдвижной размер (3шт) 330х500х240мм, полка размер (1шт) 330х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	51
		ТМ-3ПКВ	900х600х850	Дверь размер (1шт) 500х724мм, ящик выдвижной размер (3шт) 330х500х240мм, полка размер (1шт) 330х540мм, проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	52
		ТМ-4ПКВ	1500х600х850	Дверь размер (2шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 410х724мм, полка размер (1шт) 410х540мм, полка размер (1шт) 500х540мм проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	108
		ТМ-4ЛКВ	1500х600х850	Дверь размер (2шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 410х724мм, полка размер (1шт) 410х540мм, полка размер (1шт) 500х540мм проем между полок размер (2шт)	115

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
				354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	
		ТМ-5ПКВ	1500х600х850	Дверь размер (2шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 410х724мм, ящик выдвижной размер (3шт) 410х500х240мм, полка размер (1шт) 500х540мм проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	117,5
		ТМ-5ЛКВ	1500х600х850	Дверь размер (2шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 410х724мм, ящик выдвижной размер (3шт) 410х500х240мм, полка размер (1шт) 500х540мм проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	114
		ТМ-6ПКВ	1500х600х850	Дверь размер (2шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 410х724мм, ящик выдвижной размер (4шт) 410х500х180мм, полка размер (1шт) 500х540мм проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	115
		ТМ-6ЛКВ	1500х600х850	Дверь размер (2шт) 500х724мм, дверь размер (1шт) 410х724мм, ящик выдвижной размер (4шт) 410х500х180мм, полка размер (1шт) 500х540мм проем между полок размер (2шт) 354мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	117
		ТМУ-1КВ	950х950х850	Дверь размер (1шт) 420х724мм, раковина 1шт, смеситель 1шт, бортик размер:h70мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	67

Таблица 4

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
Серия Валидус-4					
1.1	Тумбы подкатные	ТП-1СТ	450х430х660мм	Проем между полок размер (2шт): 268мм; полка (1шт.), размер:418х390мм; дверь (1шт.), размер:450х566мм, колесные опоры h70мм.	27

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
		ТП-2СТ	450х430х660мм	Проем между полок размер (2шт): 207мм; полка (1шт.), размер:418х390мм; дверь (1шт.), размер:450х446мм; ящик размер (1шт) 450х400х120мм; колесные опоры h70мм.	24
		ТП-3СТ	450х430х660мм	Проем между полок размер (2шт): 207мм; полка (1шт.), размер:418х390мм; ниша размер 120мм; дверь (1шт.), размер:450х446мм; колесные опоры h70мм.	28
		ТП-4СТ	450х430х660мм	Проем между полок размер: отсутствует; полка: отсутствует; дверь: отсутствует; ящик размер (4шт) 450х400х140мм; колесные опоры h70мм.	26
		ТП-5СТ	450х430х660мм	Проем между полок размер: отсутствует; полка: отсутствует; дверь: отсутствует; ящик размер (5шт) 450х400х111мм; колесные опоры h70мм.	25
		ТП-6СТ	450х430х800мм	Проем между полок размер (2шт): 218мм; полка (1шт.), размер:418х390мм; дверь (1шт.), размер:450х460мм, ящик размер (1шт) 450х400х120мм; колесные опоры h70мм.	31
		ТА-7СТ	800х400х800мм	Проем между полок размер (2шт): 338мм; полка (1шт.), размер:768х360мм; дверь (2шт.), размер:400х706мм, колесные опоры h70мм.	47
		ТА-8СТ	800х400х800мм	Проем между полок размер (2шт): 218мм; полка (1шт.), размер:768х360мм; дверь (2шт.) размер:400х460мм, ящик размер (2шт) 800х350х120мм; колесные опоры h70мм.	45
		ТА-9СТ	800х400х800мм	Проем между полок размер отсутствует; полка размер: отсутствует; ящик размер (5шт) 800х350х140мм; колесные опоры h70мм.	49
		ТА-10СТ	800х400х800мм	Проем между полок размер (2шт): 218мм; полка (1шт.), размер:768х360мм; ниша высота проема, размер (2шт) 120мм; дверь (2шт.) размер:400х452мм, ящик размер: отсутствует; колесные опоры h70мм.	51
		ТА-11СТ	800х400х800мм	Проем между полок размер отсутствует; полка размер: отсутствует; ящик размер (6шт) 800х350х115мм; колесные опоры h70мм.	49
1.2	Шкафы	ШМ-1СТ	400х400х1900	Дверь размер (1шт) 400х1780мм, полки размер (4шт) 368х360мм, проем между полок размер (5шт)	37

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
				343мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	
		ШМ-2СТ	400х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме размер (1шт) 400х1780мм, полки размер (4шт) 368х360мм, проем между полок размер (5шт) 343мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	34
		ШМ-3СТ	400х400х1900	Дверь размер: отсутствует, полки размер (4шт) 368х360мм, проем между полок размер (5шт) 343мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	39
		ШМ-4СТ	400х400х1900	Дверь размер (1шт) 400х706мм, дверь стекло в алюминиевой раме размер (1шт) 400х1070мм, полки размер (3шт) 368х360мм, проем между полок размер (5шт) 343мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	37
		ШМ-5СТ	400х400х1900	Дверь размер (1шт) 400х706мм, дверь размер (1шт) 400х1070мм, полки размер (3шт) 368х360мм, проем между полок размер (5шт) 343мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	42
		ШМ-6СТ	400х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме размер (1шт) 400х1070мм, полки размер (2шт) 368х360мм, проем между полок размер (5шт) 343мм, ящики размер (3шт) 400х350х233мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	41
		ШМ-7СТ	800х400х1900	Дверь размер (2шт) 400х706мм, дверь стекло в алюминиевой раме размер (2шт) 400х1070мм, полки размер (3шт) 768х360мм, проем между полок размер (5шт) 343мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	51
		ШМ-8СТ	800х400х1900	Дверь размер (2шт) 400х706мм, дверь размер (2шт) 400х1070мм, полки размер (3шт) 768х360мм, проем между полок размер (5шт) 343мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	49
		ШМ-9СТ	800х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме размер (2шт) 400х1780мм, полки размер (4шт) 768х360мм, проем между полок размер (5шт) 343мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	53
		ШМ-10СТ	800х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме размер (2шт) 400х1070мм, полки размер (2шт) 768х360мм, проем между полок размер (5шт) 343мм, ящики размер (6шт) 400х350х233мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	55

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
		ШМ-11СТ	800х400х1900	Дверь размер: отсутствует, , полки размер (3шт) 768х360мм, проем между полок размер (5шт) 343мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	56
		ШМ-12СТ	800х400х1900	Дверь стекло в алюминиевой раме размер (2шт) 400х1070мм, полки размер (2шт) 768х360мм, проем между полок размер (5шт) 343мм, ящики размер (8шт) 400х350х175мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	58
		ША-1СТ	400х400х400	Дверь размер (2шт) 200х400мм, полка размер (1шт) 368х360, поем между полок размер (2шт) 176мм.	22
		ША-2СТ	800х400х400	Дверь в алюминиевой раме размер (2шт) 400х400мм, полка размер (1шт) 768х360, поем между полок размер (2шт) 176мм.	29
		ШК-1СТ	400х400х1200	Дверь размер и кол-во: отсутствует, полки размер и кол- во: отсутствует, ящики размер (4шт) 400х350х268мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	56
		ШК-2СТ	400х400х1200	Дверь размер и кол-во: отсутствует, полки размер и кол- во: отсутствует, ящики размер (8шт) 400х350х135мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	59
		ШК-3СТ	800х400х1200	Дверь размер и кол-во: отсутствует, полки размер и кол- во: отсутствует, ящики размер (8шт) 400х350х268мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	103
		ШК-4СТ	800х400х1200	Дверь размер и кол-во: отсутствует, полки размер и кол- во: отсутствует, ящики размер (16шт) 400х350х135мм, ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	112
1.3	Тумбы стационарные	ТК-1СТ	400х600х900	Дверь размер и кол-во (1шт): 400х756мм; полка размер (1шт) 368х498мм; проем между полок (2шт): 363мм; ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	49
		ТК-2СТ	400х600х900	Дверь размер и кол-во: отсутствует; полка размер: отсутствует; ящик размер (3шт) 400х450х250мм; ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	51
		ТК-3СТ	400х600х900	Дверь размер и кол-во: отсутствует; полка размер:	54

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
				отсутствует; ящик размер (4шт) 400х450х187мм; ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	
		ТК-4СТ	800х600х900	Дверь размер и кол-во: отсутствует; полка размер: отсутствует; ящик размер (3шт) 800х450х250мм; ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	68
		ТК-5СТ	800х600х900	Дверь размер и кол-во (2шт): 400х756мм; полка размер (1шт) 368х498мм; проем между полок (2шт): 363мм; ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	69
		ТК-6СТ	800х600х900	Дверь размер и кол-во (2шт): 350х756мм; полка размер отсутствует; ножки с регулируемыми опорами размер 120мм.	72
		НК-1СТ	400х350х400	Дверь стекло в алюминиевой раме размер и кол-во: 1(шт) 400х400мм; полка размер: 368х310мм; проем между полок размер: (2шт) 350мм.	27
		НК-2СТ	400х350х400	Дверь размер и кол-во: (1шт) 400х400мм; полка размер: 368х310мм; проем между полок размер: (2шт) 350мм.	29
		НК-3СТ	800х350х400	Дверь стекло в алюминиевой раме размер и кол-во: (2шт) 400х400мм; полка размер: 768х310мм; проем между полок размер: (2шт) 350мм.	43
		НК-4СТ	800х350х400	Дверь размер и кол-во: (2шт) 400х400мм; полка размер: 768х310мм; проем между полок размер: (2шт) 350мм.	47

Таблица 5

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
Серия Валидус-5					
1.1	Кушетки	КС-1	2000х650х700	Каркас: труба диаметром 30х2мм; углы ложа: радиус скругления 60мм; изголовье размер: 650х550мм; угол подъема изголовья 0-30градусов.	26
		КС-2	2000х650х700	Каркас: бук; углы ложа: радиус скругления 60мм; изголовье размер: 650х550мм; угол подъема изголовья 0-30градусов.	24
1.2	Ширмы	Ш-1	800х1700	Каркас: профиль алюминиевый 20х20х1,5мм; полотно: ткань полиамидная.	17

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики	Масса, не более, кг
		Ш-2	1600х1700	Каркас: профиль алюминиевый 20х20х1,5мм; полотно: ткань полиамидная.	21
		Ш-3	2400х1700	Каркас: профиль алюминиевый 20х20х1,5мм; полотно: ткань полиамидная.	23
		Ш-4	800х1700	Каркас: бук 20х50мм; полотно: ткань полиамидная.	17
		Ш-5	1600х1700	Каркас: бук 20х50мм; полотно: ткань полиамидная.	21
		Ш-6	2400х1700	Каркас: бук 20х50мм; полотно: ткань полиамидная.	23

Примечания

По желанию заказчика изделия поставляется в собранном и разобранном виде.

Предельные отклонения габаритных размеров изделий не должны превышать ± 4 мм.

8.2 Основные параметры

• Столешницы столов, тумб, полки и дно ящиков должны выдерживать предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку:

- на столешницу столов – $30 \pm 1,0$ кг;

- на полку и дно ящика – $15 \pm 1,0$ кг

• Кушетки должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку:

- кушетки 270 даН.

• Покоробленность дверей шкафов должна быть не более 1,2 мм.

• Зазоры в проемах дверей на сторону должны составлять не более 2,0 мм.

• Изделия мебели медицинской должны устанавливаться на колесные опоры, либо на неподвижные опоры обеспечивающие устойчивость на твердой горизонтальной поверхности пола. Диаметр колес должен быть не менее 75 мм.

• Зазор между поверхностью пола и одной из опор (или колес) должен быть не более 3 мм.

• Напольные тумбы и шкафы должны быть оснащены винтовыми опорами для выставления мебели на поверхности.

• Замки дверей шкафов и ящиков тумб (при наличии) должны обеспечивать надежное, легкое запирание и открывание, плотное прилегание дверей к корпусу шкафа.

• Двери без замков должны иметь устройство, предотвращающее их самопроизвольное открывание.

• Петли дверей должны иметь амортизаторы, обеспечивающие их плавное, без перекосов открывание и закрывание с усилием не более 20 Н (2 кгс).

• Ящики должны выдвигаться по направляющим и иметь устройство, предотвращающее их выпадение из корпуса при выдвижении.

• Выдвижение ящиков по роликовым или телескопическим направляющим должно быть плавным, без заеданий и перекосов.

• Усилие выдвижения ящиков должно быть не более 15 Н.

• Перемещение изделий на колесных опорах по ровной горизонтальной поверхности должно осуществляться плавно, без заеданий.

• Усилие перемещения столиков подкатных и тумб на колесных опорах без нагрузки по твердой плоской поверхности должно быть не более 50 Н (5 кгс).

• Изделия мебели медицинской, закрывающиеся дверцами и имеющие выдвижные ящики не должны перемещаться при открывании дверей или выдвижении ящиков.

• Вкладные и накладные элементы, включая декоративные (при их наличии), должны быть, закреплены неподвижно, ребра притуплены.

• Толщина полок и дверей из ударопрочного стекла должна быть не менее 5 мм.

Категория мягкости мягких элементов кушеток должна быть не менее IV по ГОСТ 19917-2014.

- Обивочный материал должен быть плотно (без морщин и складок) натянут на мягком элементе и основании ложа.
- Крепление дверцы должно выдерживать нагрузку не менее 200 Н.
- Долговечность крепления дверей, долговечность ящиков в соответствии с ГОСТ 16371.
- Поверхности изделий мебели медицинской не должны иметь вмятин, царапин, трещин, сколов, потертостей, отслоений, вздутий покрытий, клеевых пятен, следов коррозии и других дефектов.
- Лакокрасочные покрытия должны быть выполнены по ГОСТ 9.104 для группы условий эксплуатации 4. Наружные поверхности изделий должны иметь покрытия не ниже IV класса, внутренние – не ниже VI по ГОСТ 9.032.
- Покрытие не должно иметь отслоений от основного материала и должно быть стойким к истиранию и к воздействию удара.
- Цвет лакокрасочных покрытий изделий, изготовленных по одному заказу, должен быть одного цветового ряда.
- Металлические и неметаллические неорганические покрытия изделий медицинской мебели должны быть однотонными, без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации I.
- Наружные поверхности изделий должны быть устойчивы к многократной дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.
- Мебель медицинская при эксплуатации должна быть устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.
- Изделия мебели медицинской при транспортировании должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5, при хранении – для условий хранения 1 по ГОСТ 15150.
- Изделия мебели медицинской при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям.
- Изделия мебели медицинской, упакованные в транспортную упаковку должны сохранять работоспособность после механических воздействий при транспортировании.
- Средний срок службы изделий мебели медицинской до списания, не менее 8 лет.
- За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

9. Сырье, материалы и покупные изделия:

9.1 Для изготовления изделий должны использоваться материалы и покрытия разрешенные Минздравом РФ и имеющие гигиенические заключения и документы о подтверждении их соответствия. Покупные изделия должны иметь сопроводительную документацию, подтверждающую их соответствие, нормативным документам, распространяющимся на них.

9.2 Все материалы и комплектующие изделия должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297.

9.3 Вид контакта с организмом человека: кратковременный контакт с неповрежденной кожей.

9.4 Для изготовления применять следующие материалы:

9.4.1 Серия Валидус-1:

• Каркас - изготовлен из профиля прессованного из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций с анодно-окисным покрытием – по ГОСТ 22233-2001.

• **Корпус** - изготовлен из плиты МДФ 16мм (плиты древесноволокнистые средней плотности марки мдф класс эмиссии формальдегида E1 по ТУ 5536-003-50113531-2005, облицованной с двух сторон из декоративно-бумажный слоистый пластик толщиной 1мм (HPL-HighPressureLaminate) - по ТУ 2256-002-00256308-2012 или из панели композитной 15мм из трехслойного подвспененного полипропилена по ТУ 2247-003-88915836-2012;

• **Полки**- из декоративно-бумажный слоистый пластик толщиной 5 мм (HPL-HighPressureLaminate) - по ТУ 2256-002-00256308-2012.

• **Столешница**- изготовлена из декоративно-бумажный слоистый пластик толщиной 16мм (HPL-HighPressureLaminate) – по ТУ 2256-002-00256308-2012;

• **Мойки с интегрированной столешницей и бортиком** - изготовлены из литейного мрамора по ТУ 4940-001-58111170-14;

• **Направляющие**- изготовлены из стали марки Ст2 по ГОСТ 380 покрытые порошковая эпоксидно-полиэфирная краска марки П-ЭП-ПЛ по ТУ 2329-003-21707421-2004 на нейлоновых роликах с доводчиком и плавным самозакрыванием;

• **Фасады**- изготовлены из плиты ЛМДФ 16мм (плиты древесноволокнистые средней плотности марки мдф класс эмиссии формальдегида E1 по ТУ 5536-003-50113531-2005, или изготовлены из оцинкованного листа толщиной 0,8мм марки 08кп/пс ГОСТ 14918-80, покрытые порошковая эпоксидно-полиэфирная краска марки П-ЭП-ПЛ по ТУ 2329-003-21707421-2004;

• **Ручки**-изготовлены из анодированного алюминия марка РСА-1 по ГОСТ 25897-83 с межосевым расстоянием от 128мм до 160мм;

• **Опоры регулируемые** изготовлены из пластика АБС по ТУ 2246-046-00203387-98;

• **Опоры колесные**- диаметром 50 и 75мм изготовлены из полипропилена по ГОСТ 26996-86, пина: литая резина серого цвета по ГОСТ 26554-85, сталь марки Ст2 по ГОСТ 380;

• **Фасады стеклянные**- для шкафов изготовлены из ударопрочного стекла марки М1 по ГОСТ Р 54170-2010;

• **Петли** - четырех-шарнирные из нержавеющей стали AISI 304 по ГОСТ 5632-72;

• **Шурупы** – из оцинкованной стали по ГОСТ 1144.

9.4.2 Серия Валидус-2:

• **Фронтальный каркас**- изготовлен из профиля прессованного из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций с анодно-окисным покрытием – по ГОСТ 22233-2001.

• **Корпус и полки** - изготовлены из влагостойкой ЛДСП 16мм (плиты древесностружечные ламинированные типа Р5, облицованные пленками на основе термоактивных полимеров класс эмиссии формальдегида E1 по ГОСТ 32289-2013, ТУ 5534-004-44769167-12, или ДСП 16мм (плиты древесностружечные типа Р5, по ГОСТ 10632-2014, облицованной с двух сторон из декоративно-бумажный слоистый пластик толщиной 1мм (HPL-HighPressureLaminate) – по ТУ 2256-002-00256308-2012, и облицованная по периметру кромкой ПВХ толщиной 0,45мм по ГОСТ 19111-2001;

• **Столешница** - изготовлена из влагостойкой ЛДСП 22мм (плиты древесностружечные ламинированные типа Р5, облицованные пленками на основе термоактивных полимеров класс эмиссии формальдегида E1 по ГОСТ 32289-2013, ТУ 5534-004-44769167-12 и облицованная по периметру кромкой ПВХ толщиной 2 мм по ГОСТ 19111-2001;

• **Направляющие**- изготовлены из стали марки Ст2 по ГОСТ 380 покрытые порошковая эпоксидно-полиэфирная краска марки П-ЭП-ПЛ по ТУ 2329-003-21707421-2004 на нейлоновых роликах с доводчиком и плавным самозакрыванием;

• **Фасады**- изготовлены из плиты ЛМДФ 16мм (плиты древесноволокнистые средней плотности марки мдф класс эмиссии формальдегида E1 по ТУ 5536-003-50113531-2005, или изготовлены из оцинкованного листа толщиной 0,8мм марки 08кп/пс по ГОСТ 14918-80, покрытые порошковая эпоксидно-полиэфирная краска марки П-ЭП-ПЛ по ТУ 2329-003-21707421-2004;

• **Ручки**-изготовлены из анодированного алюминия марка РСА-1 по ГОСТ 25897-83 с межосевым расстоянием от 128мм до 160мм;

- **Опоры регулируемые**- изготовлены из пластика АБС по ТУ 2246-046-00203387-98;
- **Опоры колесные**- диаметром 50 и 75мм изготовлены из полипропилена по ГОСТ 26996-86, шина: литая резина серого цвета по ГОСТ 26554-85, сталь марки Ст2 по ГОСТ 380;
- **Фасады стеклянные**- для шкафов изготовлены из ударопрочного стекла марки М1 по ГОСТ Р 54170-2010.
- **Петли** - четырех-шарнирные из нержавеющей стали AISI 304, по ГОСТ 5632-72;
- **Шурупы** – из оцинкованной стали по ГОСТ 1144.

9.4.3 Серия Валидус-3:

- **Каркас** - изготовлен из профиля прессованного из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций с анодно-окисным покрытием – по ГОСТ 22233-2001;
- **Корпус и полки** - изготовлены из влагостойкой ЛДСП 16мм (плиты древесностружечные ламинированные типа Р5, облицованные пленками на основе термоактивных полимеров класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289-2013, ТУ 5534-004-44769167-12, или ДСП 16мм (плиты древесностружечные типа Р5, по ГОСТ 10632-2014, облицованной с двух сторон из декоративно-бумажный слоистый пластик толщиной 1мм (HPL-HighPressureLaminate) – по ТУ 2256-002-00256308-2012 и облицованная по периметру кромкой ПВХ толщиной 0,45мм по ГОСТ 19111-2001;
- **Столешница**- изготовлена из влагостойкой ЛДСП 22мм (плиты древесностружечные ламинированные типа Р5, облицованные пленками на основе термоактивных полимеров класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289-2013, ТУ 5534-004-44769167-12, и облицованная по периметру кромкой ПВХ толщиной 2 мм по ГОСТ 19111-2001;
- **Направляющие**- изготовлены из стали марки Ст2 по ГОСТ 380 покрытые порошковая эпоксидно-полиэфирная краска марки П-ЭП-ПЛ по ТУ 2329-003-21707421-2004 на нейлоновых роликах с доводчиком и плавным самозакрыванием;
- **Фасады** - изготовлены из плиты ЛМДФ 16мм (плиты древесноволокнистые средней плотности марки мдф класс эмиссии формальдегида Е1 по ТУ 5536-003-50113531-2005, или изготовлены из оцинкованного листа толщиной 0,8мм марки 08кп/пс ГОСТ 14918-80, покрытые порошковая эпоксидно-полиэфирная краска марки П-ЭП-ПЛ по ТУ 2329-003-21707421-2004;
- **Ручки**-изготовлены из анодированного алюминия марка РСА-1 по ГОСТ 25897-83 с межосевым расстоянием от 128мм до 160мм;
- **Опоры регулируемые** изготовлены из пластика АБС по ТУ 2246-046-00203387-98;
- **Опоры колесные**- диаметром 50 и 75мм изготовлены из полипропилена по ГОСТ 26996-86, шина: литая резина серого цвета по ГОСТ 26554-85, сталь марки Ст2 по ГОСТ 380;
- **Фасады стеклянные** для шкафов изготовлены из ударопрочного стекла марки М1 по ГОСТ Р 54170-2010;
- **Петли** - четырех-шарнирные из нержавеющей стали AISI 304, по ГОСТ 5632-72;
- **Шурупы** – из оцинкованной стали по ГОСТ 1144.

9.4.4 Серия Валидус-4:

- **Каркас, корпус, полки и фасады**- изготовлены из влагостойкой ЛДСП 16мм (плиты древесностружечные ламинированные типа Р5, облицованные пленками на основе термоактивных полимеров класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289-2013, ТУ 5534-004-44769167-12, или ДСП 16мм (плиты древесностружечные типа Р5, по ГОСТ 10632-2014, облицованной с двух сторон из декоративно-бумажный слоистый пластик толщиной 1мм (HPL-HighPressureLaminate) - ТУ 2256-002-00256308-2012 и облицованная по периметру кромкой ПВХ толщиной 0,45мм и 2мм по ГОСТ 19111-2001.
- **Столешница** из влагостойкой ЛДСП 22мм (плиты древесностружечные ламинированные типа Р5, облицованные пленками на основе термоактивных полимеров класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289-2013, ТУ 5534-004-44769167-12, или облицованной с двух сторон из декоративно-бумажный слоистый пластик толщиной 1мм (HPL-

HighPressureLaminate) - ТУ 2256-002-00256308-2012, и облицованная по периметру кромкой ПВХ толщиной 2 мм.

- **Направляющие роликовые** изготовлены из стали марки Ст2 по ГОСТ 380 покрытые порошковая эпоксидно-полиэфирная краска марки П-ЭП-ПЛ по ТУ 2329-003-21707421-2004 на нейлоновых роликах с доводчиком и плавным самозакрыванием;

- **Ручки** алюминиевые анодированные;

- **Опоры регулируемые** изготовлены из стали марки Ст2 по ГОСТ 380 покрытые порошковая эпоксидно-полиэфирная краска марки П-ЭП-ПЛ по ТУ 2329-003-21707421-2004;

- **Опоры колесные** изготовлены из стали марки Ст2 по ГОСТ 380 изготовлены и из пластика АБС по ТУ 2246-046-00203387-98;

- **Петли** - четырех-шарнирные из нержавеющей стали AISI 304, по ГОСТ 5632-72,

- **Шурупы** – из оцинкованной стали по ГОСТ 1144.

9.4.5 Серия Валидус-5:

- **Винилискожа** по ТУ8714-138-05790484-2011;

- **Краска порошковая эпоксидно-полиэфирная «МЕДЛАК»** по ТУ 2329-002-45318751-2008;

- **Пленка ПГП-0,30** по ГОСТ 9998-86;

- **Труба сталь г/к Ст2** по ТУ 1373-013-02949352-2003;

- **Шурупы** из оцинкованной стали по ГОСТ 1144;

- **Болты** из оцинкованной стали по ГОСТ 7805-70.

9.4.6 Материалы упаковки

- гофрированный картон марки "Т-4" по ГОСТ 7376;

- полиэтиленовый пакет по ГОСТ 10354;

- бумага по ГОСТ 8273;

- шпагат по ГОСТ 17308.

10. Комплектность

Комплект поставки мебели медицинской должен соответствовать таблице 6 РЭ.

Таблица 6

№ п/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
1.	Серия Валидус-1:		
1.1	Тумбы подкатные, в вариантах исполнения:		
	ТПКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.
	ТП-1КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТП-2КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТП-3КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТП-4КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТП-5КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТП-6КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТП-7КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТП-8КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТП-9КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТП-10КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТП-11КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
1.2	Шкафы, в вариантах исполнения:		
	ШМКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШМСКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*

№ п/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ШМ-1КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШМ1-СФКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-2КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-3КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-4КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-5КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-6КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-7КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-8КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-9КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-10КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-11КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-12КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-13КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-14КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШМУКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШМЭН-1КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШК-1КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШК-2КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШК-3КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШК-4КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШМЛКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШМЛСКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
1.3	Шкафы навесные, в вариантах исполнения:		
	ШН-1КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШН-1СКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШН-2КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШН-2СКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШН-3КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШН-3СКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШН-4КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШН-4СКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШН-5КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШН-5СКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШНУ-1КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
1.4	Тумбы стационарные, в вариантах исполнения:		
	ТБ-1КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.
	ТБ-2КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-3КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-4КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-5КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-6КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-7КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-8КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-9КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-10КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-11КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТБУКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*

№ п/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
1.5	Тумбы с мойкой, в вариантах исполнения:		
	ТМ-1КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-2КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-ЛКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-ПКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-1ПКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-1ЛКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-3ЛКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-3ПКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-4ПКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-4ЛКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-5ПКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-5ЛКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-6ПКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-6ЛКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ТМУ-1КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
1.6	Столики подкатные, в вариантах исполнения:		
	СТКН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	СТ-3КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	СТ-4КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
1.7	Шкафы вытяжные, в вариантах исполнения:		
	ШВ-1КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШВ-2КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШВ-3КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	ШВ-4КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
1.8	Стеллажи, в вариантах исполнения:		
	СЛ-1КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	СЛ-2КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	СЛ-3КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
1.9	Столы пеленальные, в вариантах исполнения:		
	СП-1КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	СП-2КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	СП-3КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
1.10	Столы весовые, в вариантах исполнения:		
	СВ-1КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
	СВ-2КН	ВЛДС.942819.001.001	от 1 до 100 шт.*
1.11	Руководство по эксплуатации **	ВЛДС.942819.001.РЭ	
2.	Серия Валидус-2		
2.1	Столы пеленальные, в вариантах исполнения:		
	СП-1К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.
	СП-2К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	СП-3К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*

№ п/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
2.2	Тумбы подкатные, в вариантах исполнения:		
	ТПК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТП-1К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТП-2К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТП-3К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТП-4К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТП-5К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТП-6К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТП-7К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТП-8К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТП-9К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТП-10К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТП-11К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТПБ-1К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТПБ-2К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
2.3	Шкафы, в вариантах исполнения:		
	ШМК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШМСК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-1К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШМ1-СФК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-2К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-3К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-4К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-5К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-6К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-7К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-8К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-9К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-10К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-11К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-12К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-13К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-14К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШО-1К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШК-1К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШК-2К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШК-3К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШК-4К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШН-1СК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШН-2К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШН-2СК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШН-3К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШН-3СК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШН-4К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШН-4СК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШН-5К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШН-5СК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ШНУ-1К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*

№ п/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
2.4	Тумбы стационарные, в вариантах исполнения:		
	ТБ-1К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.
	ТБ-2К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-3К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-4К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-5К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-6К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-7К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-8К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-9К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-10К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-11К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТБУК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-1К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-2К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-ЛК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-ПК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-1ПК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-1ЛК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-3ЛК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-3ПК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-4ПК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-4ЛК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-5ПК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-5ЛК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-6ПК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-6ЛК	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
	ТМУ-1К	ВЛДС.942819.001.002	от 1 до 100 шт.*
2.5	Руководство по эксплуатации **	ВЛДС.942819.001.РЭ	
3.	Серия Валидус-3		
3.1	Столы пеленальные, в вариантах исполнения:		
	СП-1КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	СП-2КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	СП-3КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
3.2	Тумбы подкатные, в вариантах исполнения:		
	ТПКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТП-1КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТП-2КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТП-3КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТП-4КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТП-5КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТП-6КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТП-7КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТП-8КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТП-9КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТП-10КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*

№ п/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ТП-11КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТПБ-1КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТПБ-2КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
3.3	Шкафы, в вариантах исполнения:		
	ШМКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.
	ШМСКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-1КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШМ1-СФКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-2КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-3КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-4КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-5КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-6КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-7КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-8КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-9КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-10КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-11КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-12КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-13КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-14КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШО-1КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШК-1КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШК-2КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШК-3КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШК-4КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШН-1СКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШН-2КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШН-2СКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШН-3КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШН-3СКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШН-4КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШН-4СКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШН-5КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШН-5СК	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ШНУ-1КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
3.4	Тумбы стационарные, в вариантах исполнения:		
	ТБ-1КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.
	ТБ-2КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-3КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-4КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-5КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-6КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-7КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-8КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-9КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-10КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТБ-11КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*

№ п/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ТБУКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-1КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-2КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-ЛКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-ПКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-1ПКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-1ЛКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-3ЛКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-3ПКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-4ПКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-4ЛКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-5ПКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-5ЛКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-6ПКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТМ-6ЛКВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
	ТМУ-1КВ	ВЛДС.942819.001.003	от 1 до 100 шт.*
3.5	Руководство по эксплуатации **	ВЛДС.942819.001.РЭ	
4.	Серия Валидус-4		
4.1	Тумбы подкатные, в вариантах исполнения:		
	ТП-1СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.
	ТП-2СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.
	ТП-3СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ТП-4СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ТП-5СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ТП-6СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ТА-7СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ТА-8СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ТА-9СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ТА-10СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ТА-11СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
4.2	Шкафы, в вариантах исполнения:		
	ШМ-1СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-2СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-3СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-4СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-5СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-6СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-7СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-8СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-9СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-10СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-11СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ШМ-12СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ША-1СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ША-2СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ШК-1СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ШК-2СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*

№ п/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ШК-3СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ШК-4СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
4.3	Тумбы стационарные, в вариантах исполнения:		
	ТК-1СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ТК-2СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ТК-3СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ТК-4СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ТК-5СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	ТК-6СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	НК-1СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	НК-2СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	НК-3СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
	НК-4СТ	ВЛДС.942819.001.004	от 1 до 100 шт.*
4.4	Руководство по эксплуатации **	ВЛДС.942819.001.РЭ	
5.	Серия Валидус-5		
5.1	Кушетки, в вариантах исполнения:		
	КС-1	ВЛДС.942819.001.005	от 1 до 100 шт.
	КС-2	ВЛДС.942819.001.005	от 1 до 100 шт.*
5.2	Ширмы, в вариантах исполнения:		
	Ш-1	ВЛДС.942819.001.005	от 1 до 100 шт.
	Ш-2	ВЛДС.942819.001.005	от 1 до 100 шт.*
	Ш-3	ВЛДС.942819.001.005	от 1 до 100 шт.*
	Ш-4	ВЛДС.942819.001.005	от 1 до 100 шт.*
	Ш-5	ВЛДС.942819.001.005	от 1 до 100 шт.*
	Ш-6	ВЛДС.942819.001.005	от 1 до 100 шт.*
5.3	Руководство по эксплуатации **	ВЛДС.942819.001.РЭ	
* Поставляется при необходимости. Изделия, входящие в состав вариантов исполнения (в том числе в отношении варианта исполнения и (или) количества) поставляются по выбору заказчика. ** Руководство по эксплуатации – 1 экз. на набор мебели.			

11. Маркировка

11.1. Маркировка изделий мебели медицинской должна соответствовать требованиям требованиям ТУ.

11.2. На каждом изделии мебели медицинской должна быть прикреплена бумажная этикетка, на которой должно быть указано:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- адрес изготовителя;
- наименование и обозначение изделия;
- серийный номер;
- дата выпуска;
- гарантийный срок;
- обозначение ТУ.
- штамп ОТК;

11.3. На потребительской упаковке должен быть наклеен бумажный ярлык, содержащий:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и обозначение изделия;
- обозначение настоящих технических условий;
- комплектность;
- год и месяц упаковывания.

11.4. Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. На транспортную упаковку должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Не кантовать», «Верх», «Береечь от влаги».

Манипуляционные знаки должны наноситься по трафарету или штемпелеванием черной водостойкой краской.

12. Упаковка

12.1. Упаковка должна быть выполнена в соответствии с требованиями, ГОСТ 16371 и настоящих ТУ.

12.2. Перед упаковкой металлические части изделий должны быть обезжирены и законсервированы по группе П-1 ГОСТ 9.014 для условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

12.3. Потребительская упаковка:

Торцы составных частей одного изделия должны быть защищены полосами из гофрокартона, затем изделие должно быть уложено в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142, оклеенный клейкой лентой. Изнутри ящик выложен упаковочной бумагой по ГОСТ 515 или по ГОСТ 8828 или гофрированным картоном марки "Т-4" по ГОСТ 7376, для предотвращения самопроизвольного перемещения изделия внутри упаковки при транспортировании.

12.4. Неустановленные на изделия детали (фурнитура, крепеж и пр.), а также эксплуатационная и товаросопроводительная документация должны быть упакованы в полиэтиленовый пакет по ГОСТ 10354, а затем помещены в потребительскую упаковку вместе с изделием.

12.5. Для транспортирования изделия в потребительских упаковках помещают в ящик по ГОСТ 5959 или в ящик типа V по ГОСТ 2991 или типа III по ГОСТ 12082, выложенный внутри упаковочной бумагой по ГОСТ 515 или по ГОСТ 8828, или гофрированным картоном марки "Т-4" по ГОСТ 7376 или древесно-волокнутой плитой по ГОСТ 4598.

12.6 Мебель медицинская может перевозиться в контейнерах в упаковке ВУ-1 по ГОСТ 9.014.

12.7 В транспортную упаковку должен быть вложен упаковочный лист, на котором должно быть указано:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- количество мест;
- условные номера упаковщика и контролера;
- дата упаковывания.

12.8 Допускается изменение упаковки, не ухудшающее устойчивости к механическим и климатическим воздействиям при транспортировании и хранении.

13. Потенциальные пользователи

Медицинский персонал.

14. Подготовка к работе и порядок работы

14.1 После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

14.2 Полученное изделие распакуйте, произведите внешний осмотр. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод в эксплуатацию без согласования с предприятием-изготовителем не допускается.

14.3 Ознакомьтесь с устройством изделия и порядком сборки, указанными в приложенной схеме сборки:

- соберите изделие согласно прилагаемой схемы сборки;
- установить оборудование в кабинете и палате в необходимом месте;
- если оборудование имеет регулируемые опоры, провести регулировку опор для придания изделию устойчивого состояния. Раскачивания и перекосы не допускаются;
- произвести дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно рекомендациям РЭ в разделе «Очистка и дезинфекция».

14.4 В течение всего срока пользования изделием обязательно производите периодическую дезинфекцию, сроки очередной дезинфекции согласно правилам, установленным в лечебно-профилактическом учреждении.

15. Указания по эксплуатации и назначение изделия

15.1. Мебель медицинская предназначена для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.

15.2. Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузок.

15.3. Эксплуатация в климатических условиях УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Таблица 7

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Показание (назначение) к применению	Противопоказания к применению
Серия Валидус-1				
1.1	Тумбы подкатные	ТПКН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-1КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-2КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-3КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-4КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-5КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного	Категорически запрещено использовать не по назначению

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Показание (назначение) к применению	Противопоказания к применению
			переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	
		ТП-6КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-7КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-8КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-9КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-10КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-11КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
1.2	Шкафы	ШМКН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМСКН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-1КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного	Категорически запрещено использовать не по назначению

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Показание (назначение) к применению	Противопоказания к применению
			медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	
		ШМ1-СФКН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-2КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-3КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-4КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-5КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-6КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-7КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-8КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-9КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-10КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования,	Категорически запрещено использовать не по назначению

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Показание (назначение) к применению	Противопоказания к применению
			инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	
		ШМ-11КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-12КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-13КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-14КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМУКН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМЭН-1КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШК-1КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШК-2КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШК-3КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШК-4КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования,	Категорически запрещено использовать не по назначению

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Показание (назначение) к применению	Противопоказания к применению
			инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	
		ШМЛКН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМЛСКН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
1.3	Шкафы навесные	ШН-1КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-1СКН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-2КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-2СКН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-3КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-3СКН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-4КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-4СКН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования,	Категорически запрещено использовать не по назначению

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Показание (назначение) к применению	Противопоказания к применению
			инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	
		ШН-5КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-5СКН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШНУ-1КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
1.4	Тумбы стационарные	ТБ-1КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБ-2КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБ-3КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБ-4КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБ-5КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБ-6КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов,	Категорически запрещено использовать не по назначению

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Показание (назначение) к применению	Противопоказания к применению
			применяемых при проведении различных процедур.	
		ТБ-7КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБ-8КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБ-9КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБ-10КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБ-11КН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБУКН	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
1.5	Тумбы с мойкой	ТМ-1КН	Организация места для санитарной обработки рук медицинского персонала и хранения дезинфицирующих медицинских средств	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМ-2КН	Организация места для санитарной обработки рук медицинского персонала и хранения дезинфицирующих медицинских средств	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМ-ЛКН	Организация места для санитарной обработки рук медицинского персонала и хранения дезинфицирующих медицинских средств	Категорически запрещено использовать не по назначению

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Показание (назначение) к применению	Противопоказания к применению
		ТМ-ПКН	Организация места для санитарной обработки рук медицинского персонала и хранения дезинфицирующих медицинских средств	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМ-1ПКН	Организация места для санитарной обработки рук медицинского персонала и хранения дезинфицирующих медицинских средств	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМ-1ЛКН	Организация места для санитарной обработки рук медицинского персонала и хранения дезинфицирующих медицинских средств	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМ-3ЛКН	Организация места для санитарной обработки рук медицинского персонала и хранения дезинфицирующих медицинских средств	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМ-3ПКН	Организация места для санитарной обработки рук медицинского персонала и хранения дезинфицирующих медицинских средств	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМ-4ПКН	Организация места для санитарной обработки рук медицинского персонала и хранения дезинфицирующих медицинских средств	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМ-4ЛКН	Организация места для санитарной обработки рук медицинского персонала и хранения дезинфицирующих медицинских средств	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМ-5ПКН	Организация места для санитарной обработки рук медицинского персонала и хранения дезинфицирующих медицинских средств	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМ-5ЛКН	Организация места для санитарной обработки рук медицинского персонала и хранения дезинфицирующих медицинских средств	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМ-6ПКН	Организация места для санитарной обработки рук медицинского персонала и хранения дезинфицирующих медицинских средств	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМ-6ЛКН	Организация места для санитарной обработки рук медицинского персонала и хранения дезинфицирующих медицинских средств	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМУ-1КН	Организация места для санитарной обработки рук медицинского персонала и хранения дезинфицирующих медицинских средств	Категорически запрещено использовать не по назначению

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Показание (назначение) к применению	Противопоказания к применению
1.6	Столики подкатные	СТКН	Организация хранения и перемещения медицинских инструментов и медикаментов	Категорически запрещено использовать не по назначению
		СТ-3КН	Организация хранения и перемещения медицинских инструментов и медикаментов	Категорически запрещено использовать не по назначению
		СТ-4КН	Организация хранения и перемещения медицинских инструментов и медикаментов	Категорически запрещено использовать не по назначению
1.7	Шкафы вытяжные	ШВ-1КН	Организация безопасного рабочего места больничного лаборанта	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШВ-2КН	Организация работы с химическими реактивами и токсичными веществами при проведении исследований	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШВ-3КН	Организация работы с химическими реактивами и токсичными веществами при проведении исследований	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШВ-4КН	Организация работы с химическими реактивами и токсичными веществами при проведении исследований	Категорически запрещено использовать не по назначению
1.8	Стеллажи	СЛ-1КН	Размещение и хранение медицинских расходных материалов, инструментов, приборов и аппаратов	Категорически запрещено использовать не по назначению
		СЛ-2КН	Размещение и хранение медицинских расходных материалов, инструментов, приборов и аппаратов	Категорически запрещено использовать не по назначению
		СЛ-3КН	Размещение и хранение медицинских расходных материалов, инструментов, приборов и аппаратов	Категорически запрещено использовать не по назначению
1.9	Столы пеленальные	СП-1КН	Для размещения, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		СП-2КН	Для размещения, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		СП-3КН	Для размещения, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.	Категорически запрещено использовать не по назначению
1.10	Столы весовые	СВ-1КН	Организация хранения тяжеловесного медицинского оборудования	Категорически запрещено использовать не по назначению
		СВ-2КН	Организация хранения тяжеловесного медицинского оборудования	Категорически запрещено использовать не по назначению

Таблица 8

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Показание к применению	Противопоказания к применению
Серия Валидус-2				
1.1	Столы пеленальные	СП-1К	Для размещения, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		СП-2К	Для размещения, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		СП-3К	Для размещения, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.	Категорически запрещено использовать не по назначению
1.2	Тумбы подкатные	ТПК	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-1К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-2К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-3К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-4К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-5К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-6К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-7К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного	Категорически запрещено использовать не по назначению

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Показание к применению	Противопоказания к применению
			медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	
		ТП-8К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-9К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-10К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-11К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТПБ-1К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТПБ-2К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
1.3	Шкафы	ШМК	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМСК	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-1К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ1-СФК	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов,	Категорически запрещено использовать не по назначению

[illegible]

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Показание к применению	Противопоказания к применению
		ШМ-12К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-13К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-14К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШО-1К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШК-1К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШК-2К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШК-3К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШК-4К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-1СК	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-2К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Показание к применению	Противопоказания к применению
		ШН-2СК	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-3К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-3СК	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-4К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-4СК	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-5К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-5СК	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШНУ-1К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
1.4	Тумбы стационарные	ТБ-1К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБ-2К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Показание к применению	Противопоказания к применению
		ТМ-5ПК	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМ-5ЛК	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМ-6ПК	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМ-6ЛК	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМУ-1К	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению

Таблица 9

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики
Серия Валидус-3				
1.1	Столы пеленальные	СП-1КВ	Для размещения, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		СП-2КВ	Для размещения, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		СП-3КВ	Для размещения, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.	Категорически запрещено использовать не по назначению
1.2	Тумбы подкатные	ТПКВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-1КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-2КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного	Категорически запрещено использовать не по назначению

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики
			медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	
		ТП-3КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-4КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-5КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-6КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-7КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-8КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-9КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-10КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-11КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТПБ-1КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования,	Категорически запрещено использовать не по назначению

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики
			инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	
		ТПБ-2КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
1.3	Шкафы	ШМКВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМСКВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-1КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ1-СФКВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-2КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-3КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-4КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-5КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-6КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики
		ШМ-7КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-8КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-9КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-10КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-11КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-12КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-13КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-14КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШО-1КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШК-1КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики
		ШК-2КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШК-3КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШК-4КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-1СКВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-2КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-2СКВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-3КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-3СКВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-4КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-4СКВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики
		ШН-5KB	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШН-5СК	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШНУ-1KB	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
1.4	Тумбы стационарные	ТБ-1KB	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБ-2KB	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБ-3KB	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБ-4KB	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБ-5KB	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБ-6KB	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБ-7KB	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Функциональные характеристики
		ТБ-8КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБ-9КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБ-10КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБ-11КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТБУКВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМ-1КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМ-2КВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМ-ЛКВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМ-ПКВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТМ-1ПКВ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению

Таблица 10

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Показание к применению	Противопоказания к применению
Серия Валидус-4				
1.1	Тумбы подкатные	ТП-1СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-2СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-3СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-4СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-5СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТП-6СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТА-7СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТА-8СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТА-9СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТА-10СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования,	Категорически запрещено использовать не по назначению

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Показание к применению	Противопоказания к применению
			инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	
		ТА-11СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
1.2	Шкафы	ШМ-1СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-2СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-3СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-4СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-5СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-6СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-7СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-8СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-9СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Показание к применению	Противопоказания к применению
		ШМ-10СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-11СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШМ-12СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ША-1СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ША-2СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШК-1СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШК-2СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШК-3СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ШК-4СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
1.3	Тумбы стационарные	ТК-1СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТК-2СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов,	Категорически запрещено

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Показание к применению	Противопоказания к применению
			малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	использовать не по назначению
		ТК-3СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТК-4СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТК-5СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		ТК-6СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		НК-1СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		НК-2СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		НК-3СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		НК-4СТ	Для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, малогабаритного переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.	Категорически запрещено использовать не по назначению

Таблица 11

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Показание к применению	Противопоказания к применению
<u>Серия Валидус-5</u>				
1.1	Кушетки	КС-1	Для размещения пациентов, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.	Категорически запрещено использовать не по назначению

№ п/п	Наименование	Обозначение исполнения	Показание к применению	Противопоказания к применению
		КС-2	Для размещения пациентов, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.	Категорически запрещено использовать не по назначению
1.2	Ширмы	Ш-1	Для размещения пациентов, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		Ш-2	Для размещения пациентов, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		Ш-3	Для размещения пациентов, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		Ш-4	Для размещения пациентов, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		Ш-5	Для размещения пациентов, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.	Категорически запрещено использовать не по назначению
		Ш-6	Для размещения пациентов, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.	Категорически запрещено использовать не по назначению

16. Очистка и дезинфекция

16.1. Для удаления загрязнений использовать влажную губку, смоченную в мыльном растворе. Растворитель не применять!

16.2. Для дезинфекции использовать 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина, или аналогичным дезинфицирующим средством на водной основе, установленном для применения в конкретном лечебном учреждении, включенные в перечень дезинфицирующих средств, зарегистрированных в Российской Федерации.

16.3. Чистку и дезинфекцию следует проводить аккуратно с использованием влажной тряпки.

16.4. Избегайте применения твердых приспособлений при чистке таких как: скребки, губки с рабочим покрытием из твердого пластикового или металлического волокнообразного материала.

17. Техническое обслуживание

17.1. Мебель медицинская имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

17.2. Периодический осмотр включает в себя: осмотр на предмет видимых повреждений, при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

17.3. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо их затянуть.

18. Транспортирование и хранение

18.1. Транспортирование мебели медицинской должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

18.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями мебели медицинской в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

18.3. Условия транспортирования мебели медицинской крытыми транспортными средствами должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (при температуре от -50 до +50 °C).

18.4. Мебель медицинская должна храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

18.5. Условия хранения мебели медицинской в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха при температуре от +5 до +40 °С).

18.6. Хранение мебели медицинской в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

19. Перечень стандартов и нормативных документов, которым соответствует медицинское изделие

ТУ 32.50.30-001-32924160-2023, ГОСТ 16371, ГОСТ 19917.

20. Утилизация

Утилизацию изделий проводить как отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21 или как твердые бытовые отходы.

21. Гарантийные обязательства

21.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

21.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с даты продажи изделия.

21.3. Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении срока гарантии
- при наличии механических повреждений частей изделия вследствие небрежной эксплуатации.

21.4. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить гарантийный талон с датой продажи, подписью продавца и печатью торгующей организации.

21.5. Доставка производится покупателем.

21.6. При неполадках, в случае неисправности изделий, при возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией, а также для подачи рекламаций просим обращаться к изготовителю по адресу:

ООО «Валидус», 601421, Россия, Владимирская область, Вязниковский район, поселок Лукново, ул. Советская, д. 2В.

Тел. +7 (495) 142-20-05.

Эл.почта: info@validusmed.ru,

Сайт: www.validusmed.ru, www.валидус.рф

22. Сведения о производителе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Валидус» (ООО «Валидус»)

Адрес места нахождения: 601421, Россия, Владимирская область, Вязниковский район, поселок Лукново, ул. Советская, д. 2В


Место производства медицинского изделия:







1. ООО «Валидус», Россия, 601421, Владимирская область, Вязниковский район, пос. Лукново, ул. Советская, д. 2В.

2. ООО «Валидус», Россия, 601421, Владимирская область, Вязниковский район, пос. Лукново, примерно в 230 м по направлению на северо-запад от ориентира земельный участок КН 33:08:110101:2 (АЗС), расположенного за пределами участка.

3. ООО «Валидус», Россия, 601422, Владимирская область, Вязниковский район, пос. Никологоры, пер. Текстильный, д. 4а

Внешний вид изделий

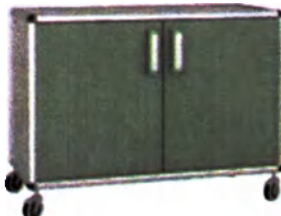Изображения Серия Валидус-1		
Тумбы подкатные		
		
ТП-1KH	ТП-1KH	ТП-2KH
		
ТП-3KH	ТП-4KH	ТП-5KH
		
ТП-6KH	ТП-7KH	ТП-8KH
		
ТП-9KH	ТП-10KH	ТП-11KH
Шкафы		
		
ШМКН	ШМСКН	ШМ-1KH

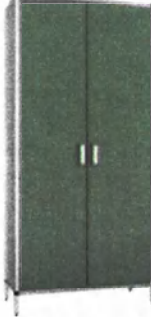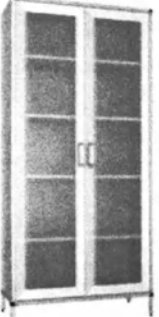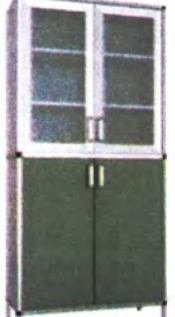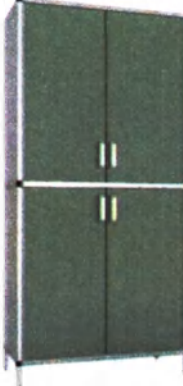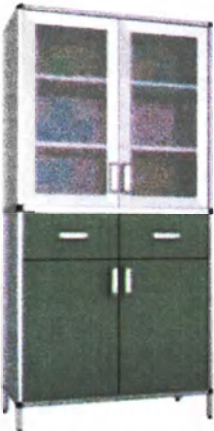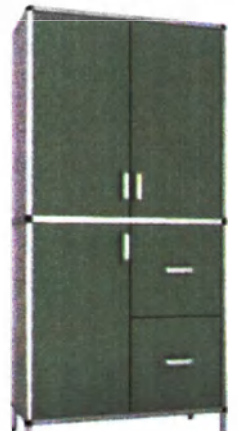
		
ШМ1-СФКН	ШМ-2КН	ШМ-3КН
		
ШМ-4КН	ШМ-5КН	ШМ-6КН
		
ШМ-7КН	ШМ-8КН	ШМ-9КН
		
ШМ-10КН	ШМ-11КН	ШМ-12КН



ШМ-13КН



ШМ-14КН

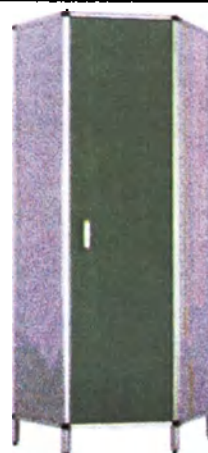

ШМУКН



ШМЭН-1КН




ШК-1КН




ШК-2КН



ШК-3КН

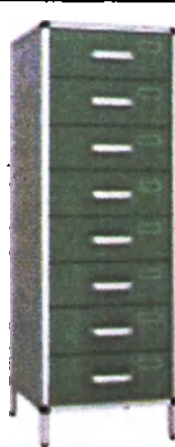

ШК-4КН

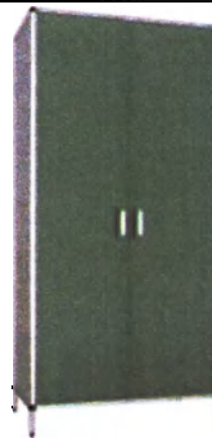

ШМЛКН




ШМЛСКН


Шкафы навесные



ШН-1КН

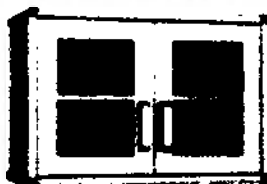


ШН-1СКН

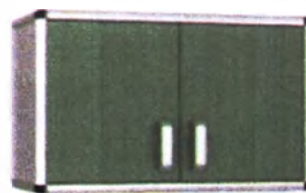


ШН-2КН




ШН-2СКН

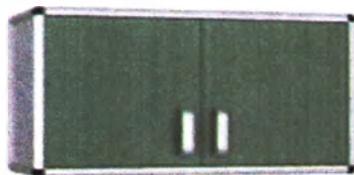


ШН-3КН

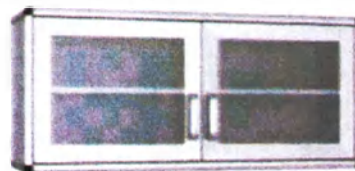

ШН-3СКН

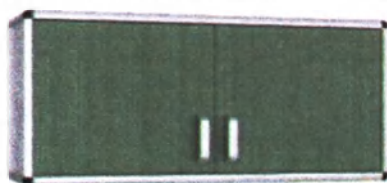


ШН-4КН

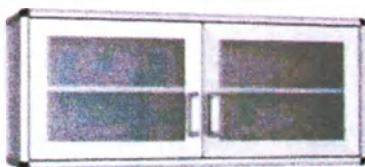


ШН-4СКН



ШН-5КН

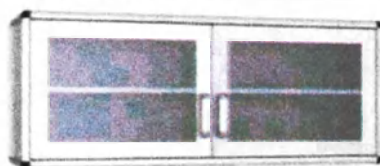

ШН-5СКН

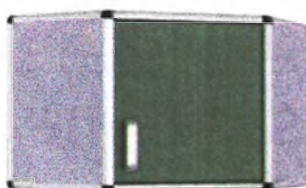

ШНУ-1КН

Тумбы стационарные



ТБ-1КН




ТБ-2КН



ТБ-3КН



ТБ-4КН

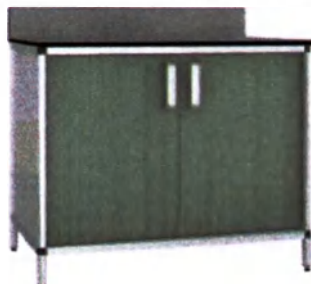

ТБ-5КН



ТБ-6КН



ТБ-7КН



ТБ-8КН




ТБ-9КН



ТБ-10КН



ТБ-11КН

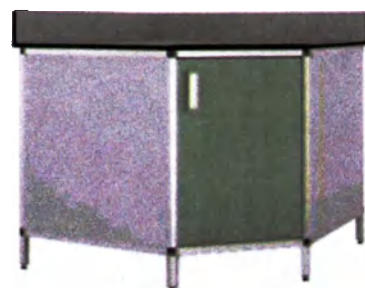

ТБУКН

Тумбы с мойкой



ТМ-1КН



ТМ-2КН



ТМ-ЛКН



ТМ-ПКН



ТМ-1ПКН



ТМ-1ЛКН



ТМ-3ЛКН



ТМ-3ПКН



ТМ-4ПКН



TM-4ЛKH



TM-5ПKH



TM-5ЛKH



TM-6ПKH




TM-6ЛKH



TMY-1KH

Столики подкатные

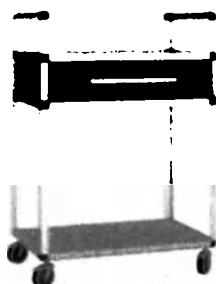

CTKH



CT-3KH



CT-4KH


Шкафы вытяжные




ШB-1KH



ШB-2KH

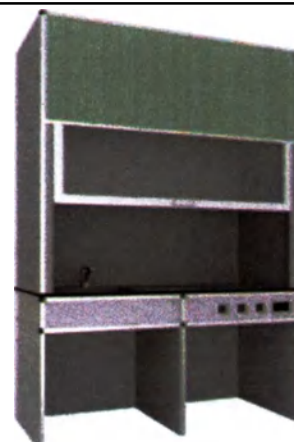


ШB-3KH

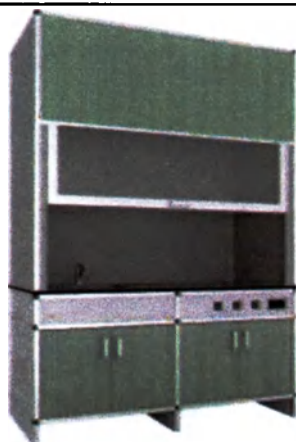

ШB-4KH


Стеллажи

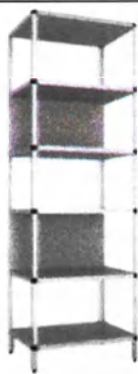

СЛ-1КН



СЛ-2КН

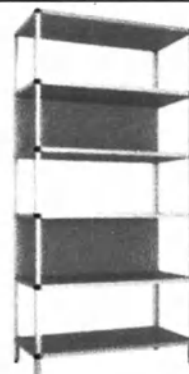

СЛ-3КН

Стол пеленальный



СП-1КН




СП-2КН



СП-3КН

Стол весовой

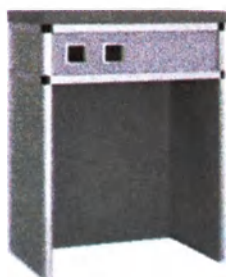

СВ-1КН



СВ-2КН

Изображения Серия Валидус-2

Стол пеленальный



СП-1К



СП-2К



СП-3К

Тумбы подкатные



ТПК



ТП-1К



ТП-2К



ТП-3К



ТП-4К



ТП-5К



ТП-6К



ТП-7К



ТП-8К



ТП-9К



ТП-10К



ТП-11К



ТПБ-1К



ТПБ-2К

Шкафы




ШМК



ШМСК



ШМ-1К

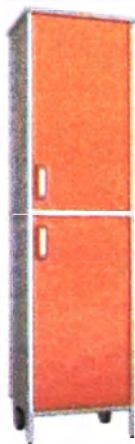

ШМ1-СФК




ШМ-2К




ШМ-3К




ШМ-4К

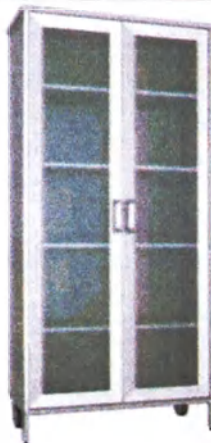

ШМ-5К

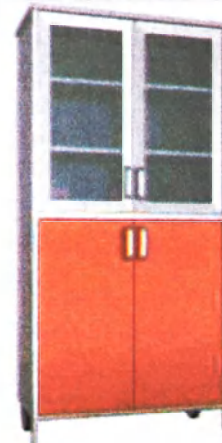

ШМ-6К

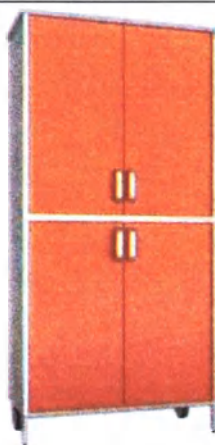

ШМ-7К



ШМ-8К



ШМ-9К



ШМ-10К



ШМ-11К



ШМ-12К



ШМ-13К



ШМ-14К



ШО-1К



ШК-1К




ШК-2К




ШК-3К




ШК-4К

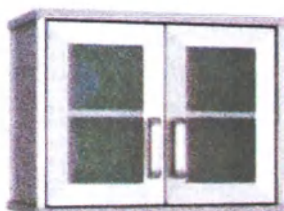

ШН-1К

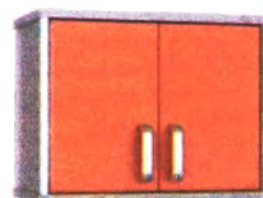


ШН-2К

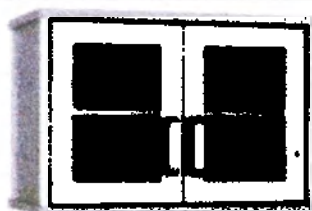

ШН-2СК



ШН-3К

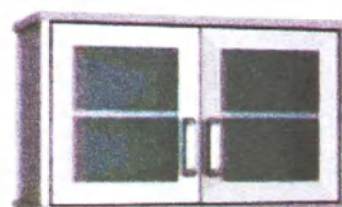

ШН-3СК




ШН-4К



ШН-4СК



ШН-5К

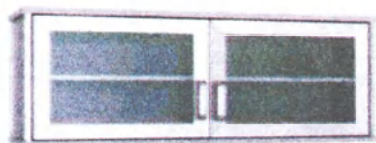

ШН-5СК



ШНУ-1К

Тумбы стационарные



ТБ-1К



ТБ-2К



ТБ-3К



ТБ-4К




ТБ-5К



ТБ-6К



ТБ-7К

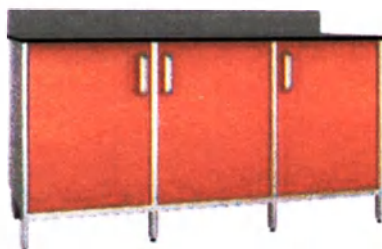

ТБ-8К



ТБ-9К



ТБ-10К



ТБ-11К




ТБУК




TM-1K



TM-2K

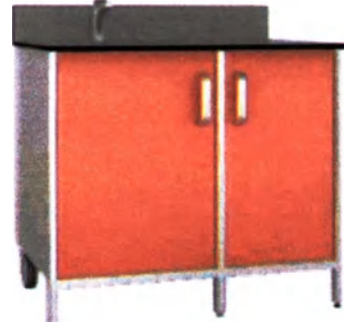

TM-ЛК

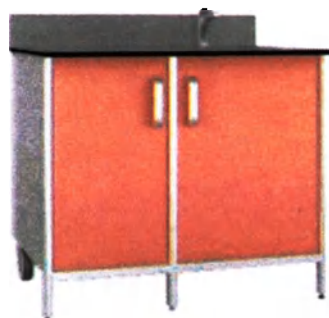

TM-ПК



TM-1ПК



TM-1ЛК




TM-3ЛК



TM-3ПК



TM-4ЛК

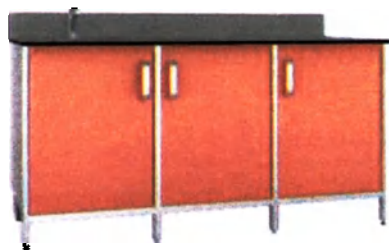

TM-4ЛК



TM-5ЛК




TM-5ЛК



TM-6ЛК



TM-6ЛК

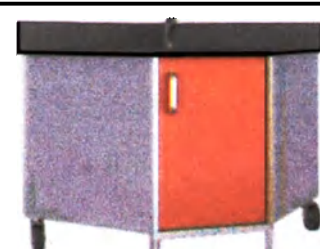

TMY-1K

Изображения Серия Валидус-3

Стол пеленальный



СП-2КВ




СП-3КВ



СП-1КВ

Тумбы подкатные

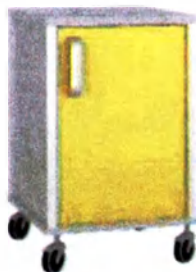

ТПКВ



ТП-1КВ



ТП-2КВ



ТП-3КВ



ТП-4КВ




ТП-5КВ




ТП-6КВ




ТП-7КВ

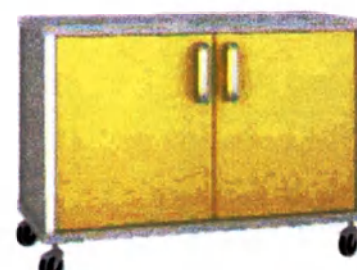


ТП-8КВ

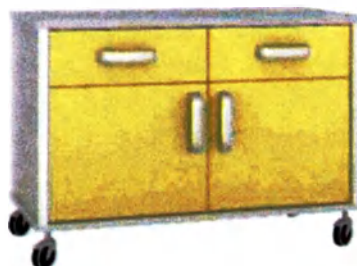

ТП-9КВ

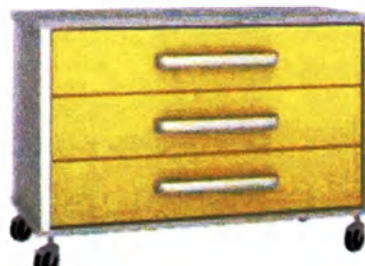

ТП-10КВ

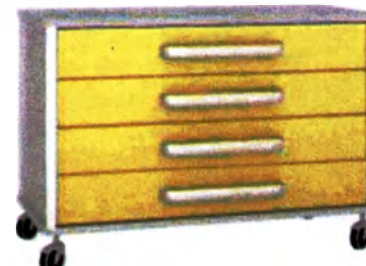

ТП-11КВ



ТПБ-1КВ



ТПБ-2КВ

Шкафы



ШМКВ



ШМСКВ



ШМ-1КВ




ШМ1-СФКВ




ШМ-2КВ



ШМ-3КВ

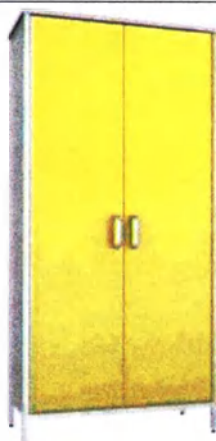

ШМ-4КВ

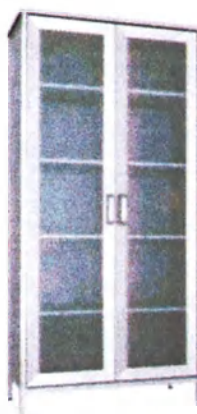

ШМ-5КВ



ШМ-6КВ




ШМ-7КВ



ШМ-8КВ



ШМ-9КВ

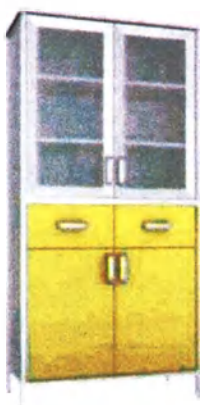

ШМ-10КВ



ШМ-11КВ



ШМ-12КВ



ШМ-13КВ



ШМ-14КВ



ШО-1КВ












ШК-1КВ



ШК-2КВ



ШК-3КВ

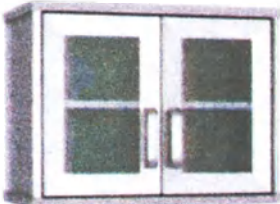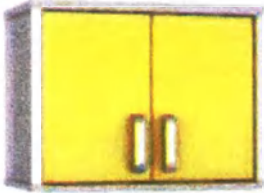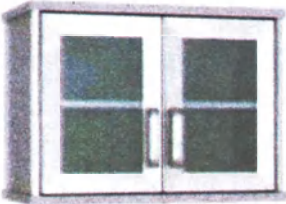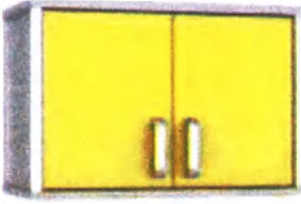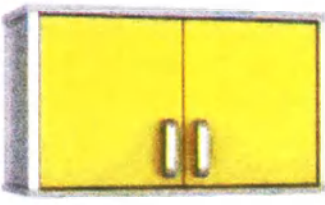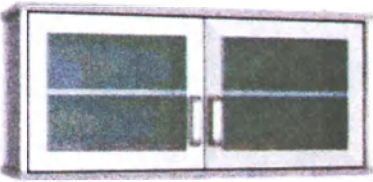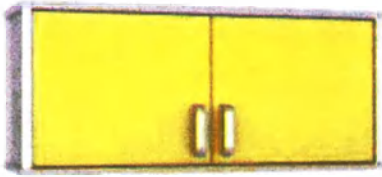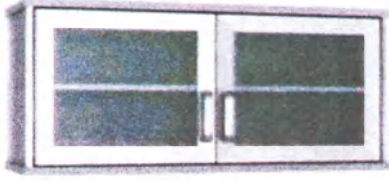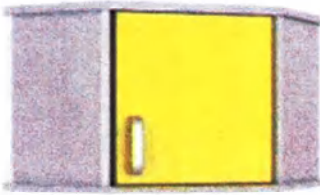 ШК-4КВ	 ШН-1СКВ	 ШН-2КВ
 ШН-2СКВ	 ШН-3КВ	 ШН-3СКВ
 ШН-4КВ	 ШН-4СКВ	 ШН-5КВ
 ШН-5СК	 ШНУ-1КВ	
Тумбы стационарные		
 ТБ-1КВ	 ТБ-2КВ	 ТБ-3КВ



ТБ-4КВ




ТБ-5КВ



ТБ-6КВ



ТБ-7КВ

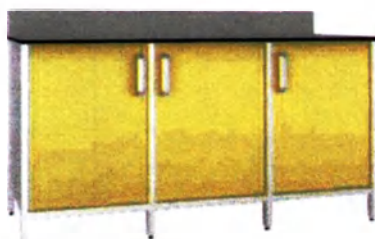

ТБ-8КВ



ТБ-9КВ




ТБ-10КВ




ТБ-11КВ




ТБУКВ

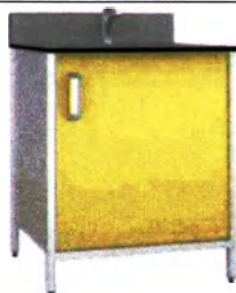


ТМ-1КВ

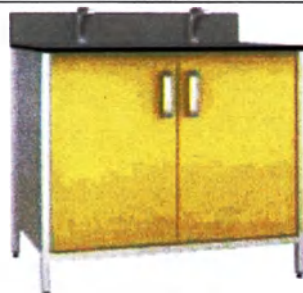


ТМ-2КВ

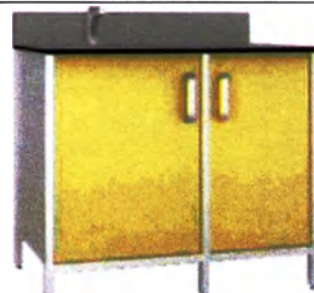

ТМ-ЛКВ

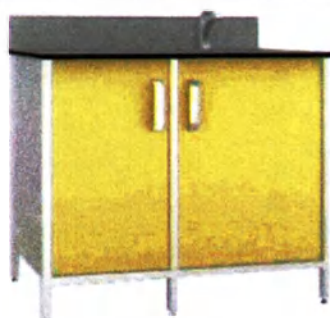







ТМ-ПКВ

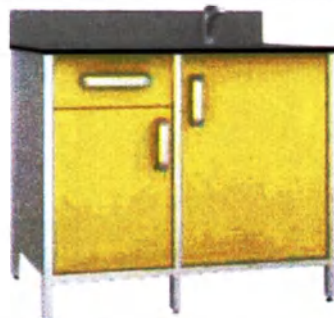





ТМ-1ПКВ









ТМ-1ЛКВ

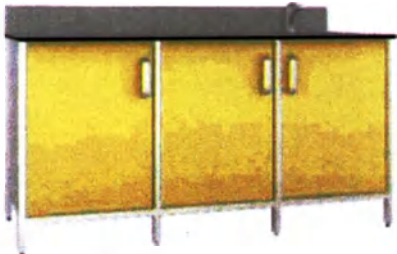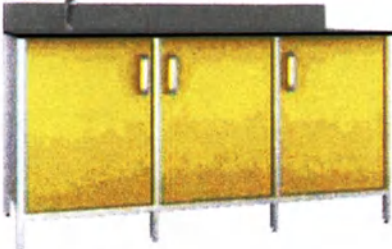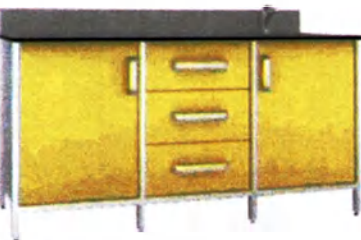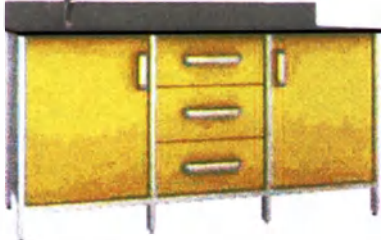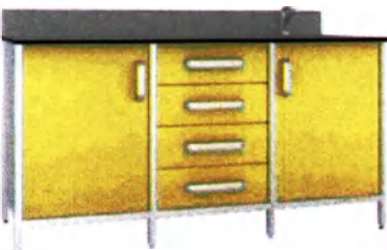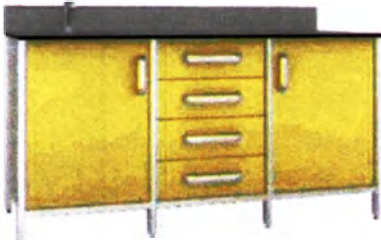		
TM-3ЛКВ	TM-3ПКВ	TM-4ПКВ
		
TM-4ЛКВ	TM-5ПКВ	TM-5ЛКВ
		
TM-6ПКВ	TM-6ЛКВ	TMY-1KB
Изображения Серия Валидус-4		
Тумбы подкатные		
		
TP-1CT	TP-2CT	TP-3CT
		
TP-4CT	TP-5CT	TP-6CT

 ТА-7СТ	 ТА-8СТ	 ТА-9СТ
 ТА-10СТ	 ТА-11СТ	
Шкафы		
 ШМ-1СТ	 ШМ-2СТ	 ШМ-3СТ
 ШМ-4СТ	 ШМ-5СТ	 ШМ-6СТ

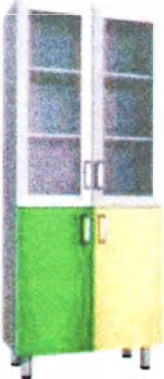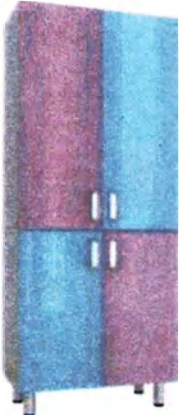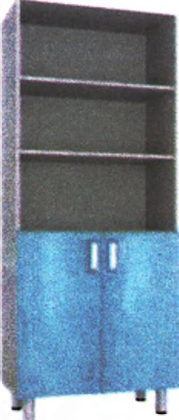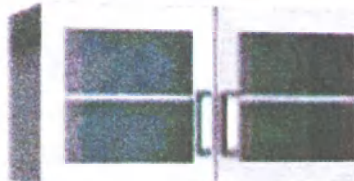 ШМ-7СТ	 ШМ-8СТ	 ШМ-9СТ
 ШМ-10СТ	 ШМ-11СТ	 ШМ-12СТ
 ША-1СТ	 ША-2СТ	 ШК-1СТ
 ШК-2СТ	 ШК-3СТ	 ШК-4СТ
Тумбы стационарные		
 ТК-1СТ	 ТК-2СТ	 ТК-3СТ

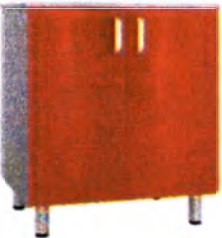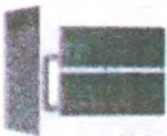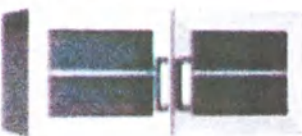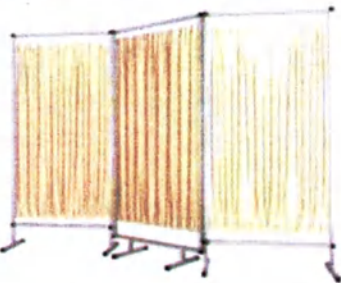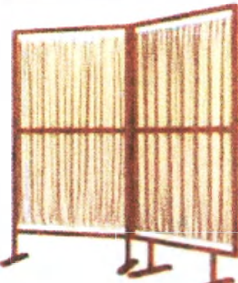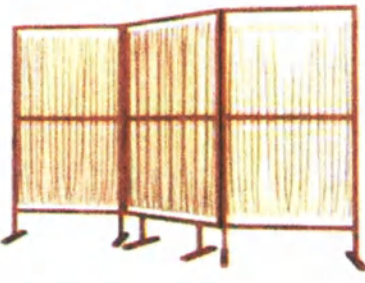		
TK-4CT	TK-5CT	TK-6CT
		
HK-1CT	HK-2CT	HK-3CT
		
HK-4CT		
Изображения Серия Валидус-5		
Кушетки		
		
KC-1	KC-2	
Ширмы		
		
Ш-1	Ш-2	Ш-3
		
Ш-4	Ш-5	Ш-6

Свидетельство о приемке

Набор медицинской мебели для оснащения кабинетов и лабораторий «Валидус», серия _____, заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 32.50.30-001-32924160-2023 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

М. П.

Подпись лиц, ответственных за приемку.

Гарантийный талон

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие

Набор медицинской мебели для оснащения кабинетов и лабораторий «Валидус», серия _____ зав. № _____
(наименование и тип изделия, заводской №)

Соответствует техническим условиям ТУ 32.50.30-001-32924160-2023

Дата выпуска _____

Приобретен _____

(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на гарантийное обслуживание



Прошито и скреплено печатью

96 листов

деканство мхмт

