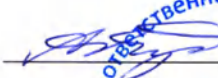


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Окей Вижен Технологии»


А.А. Ядыкин
15.06.2023 г.


Фотографические изображения

«Одноступенчатая пероксидная система для ухода и хранения линз
OKVision ONE STEP+» по ТУ 21.20.23-003-32157737-2022, в
вариантах исполнения (см. Приложение)

производства
ООО «Окей Вижен Технологии»

«Одноступенчатая пероксидная система для ухода и хранения линз OKVision ONE STEP+» по ТУ 21.20.23-003-32157737-2022, варианты исполнения:

- 1) Одноступенчатая пероксидная система для ухода и хранения линз OKVision ONE STEP+, в составе:
 1. Раствор для ухода и хранения линз OKVision ONE STEP+ во флаконах 100 мл – 1 шт.
 2. Контейнер – 1 шт., в составе:
 - крышка;
 - уплотнительное кольцо;
 - держатели для линз;
 - диск-нейтрализатор;
 - контейнер.
 3. Картонная упаковка – 1 шт.
 4. Инструкция по применению – 1 шт.
- 2) Одноступенчатая пероксидная система для ухода и хранения линз OKVision ONE STEP+, в составе:
 1. Раствор для ухода и хранения линз OKVision ONE STEP+ во флаконах 100 мл – 2 шт.
 2. Контейнер – 1 шт., в составе:
 - крышка;
 - уплотнительное кольцо;
 - держатели для линз;
 - диск-нейтрализатор;
 - контейнер.
 3. Картонная упаковка – 1 шт.
 4. Инструкция по применению – 1 шт.
- 3) Одноступенчатая пероксидная система для ухода и хранения линз OKVision ONE STEP+, в составе:
 1. Раствор для ухода и хранения линз OKVision ONE STEP+ во флаконах 250 мл – 1 шт.
 2. Контейнер – 1 шт., в составе:
 - крышка;
 - уплотнительное кольцо;
 - держатели для линз;
 - диск-нейтрализатор;
 - контейнер.
 3. Картонная упаковка – 1 шт.
 4. Инструкция по применению – 1 шт.
- 4) Одноступенчатая пероксидная система для ухода и хранения линз OKVision ONE STEP+, в составе:
 1. Раствор для ухода и хранения линз OKVision ONE STEP+ во флаконах 250 мл – 2 шт.
 2. Контейнер – 1 шт., в составе:
 - крышка;
 - уплотнительное кольцо;
 - держатели для линз;
 - диск-нейтрализатор;
 - контейнер.

3. Картонная упаковка – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.
- 5) Одноступенчатая пероксидная система для ухода и хранения линз OKVision ONE STEP+, в составе:
 1. Раствор для ухода и хранения линз OKVision ONE STEP+ во флаконах 360 мл – 1 шт.
 2. Контейнер – 1 шт., в составе:
 - крышка;
 - уплотнительное кольцо;
 - держатели для линз;
 - диск-нейтрализатор;
 - контейнер.
 3. Картонная упаковка – 1 шт.
 4. Инструкция по применению – 1 шт.
 - 6) Одноступенчатая пероксидная система для ухода и хранения линз OKVision ONE STEP+, в составе:
 1. Раствор для ухода и хранения линз OKVision ONE STEP+ во флаконах 360 мл – 2 шт.
 2. Контейнер – 1 шт., в составе:
 - крышка;
 - уплотнительное кольцо;
 - держатели для линз;
 - диск-нейтрализатор;
 - контейнер.
 3. Картонная упаковка – 1 шт.
 4. Инструкция по применению – 1 шт.

1. Упаковка. Пример общего вида + текст на упаковке + макеты упаковки всех вариантов исполнения.



Однотупенчатая пероксидная система для ухода и хранения линз OKVision® ONE STEP® для очистки и дезинфекции всех типов контактных линз (мягких гидрогелевых и силиконовых, жестких газопроницаемых склеральных, роговичных и ортокератологических, гибридных). Не содержит консервантов. Контейнер, оснащенный диском-нейтрализатором, нейтрализует перекись водорода за 6 часов. Входящий в состав поливинилпирролидон (PVP) придает раствору увлажняющие свойства.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Тщательно вымойте руки с мылом под проточной водой и высушите их.
2. Пероксидную систему следует всегда использовать с оригинальным контейнером, оснащенным диском-нейтрализатором. Никогда не используйте другой контейнер.
3. Достаньте держатель для линз из контейнера. Убедитесь, что диск-нейтрализатор закреплен на дне контейнера. Снимите линзу с правого глаза и поместите ее в держатель на помеченный буквой «R» купол. Снимите линзу с левого глаза и поместите ее на купол с пометкой «L». Закройте крышки держателей, стараясь не зацепить линзы.
4. Тщательно промойте каждую линзу в держателе над раковинной пероксидным раствором в течение 5 секунд.
5. После того как вы промыли линзы, налейте раствор в контейнер до указанной линии. Затем поместите держатель линз в контейнер и закройте его. Не трясите и не переворачивайте контейнер.
6. Держите контейнер в вертикальном положении. Оставьте линзы в растворе на ночь, однако не менее чем на 6 часов для полной нейтрализации раствора.
7. Снимите линзы с держателя. При желании, перед тем как надеть линзы, ополосните их физиологическим раствором.
8. Вылейте использованный раствор из контейнера. Для того чтобы удалить загрязнения из контейнера, промойте держатель линз и контейнер свежим пероксидным раствором и дайте просохнуть в перевернутом положении. Сушите держатель отдельно от контейнера.
9. Если вы не планируете надевать линзы сразу после обработки, их можно оставить в закрытом контейнере до 3-х дней. Если линзы остаются в растворе более 3-х дней, то перед тем как их надеть, проведите процедуру обработки еще раз, используя для этого свежий пероксидный раствор.



Для удаления белков и других загрязнений с линз можно воспользоваться дополнительными очищающими средствами, если это рекомендовано офтальмологом.

ВАЖНО:

1. Раствор следует всегда использовать с оригинальным контейнером, оснащенным диском-нейтрализатором. Никогда не используйте другой контейнер.
2. Перекись водорода является очень эффективным дезинфицирующим раствором. Раствор, который не был нейтрализован, при попадании в глаза вызывает ожог. Если вы случайно оставите линзы из активного раствора, немедленно снимите их и обильно промойте глаза стерильным физиологическим раствором или питьевой водой.
3. Никогда не наносите не нейтрализованный пероксидный раствор прямо на глаза. Раствор нейтрализуется до пригодного для глаз состояния спустя 6 часов после того, как вы налили его в контейнер с диском-нейтрализатором.
4. Для того чтобы использование линз было безопасным, перед применением проконсультируйтесь с офтальмологом. Следуйте настоящим инструкциям и соблюдайте рекомендации офтальмолога для гарантии безопасного и правильного использования контактных линз.
5. Избегайте попадания раствора на ткани.
6. Во время обработки держите контейнер вертикально.
7. Всегда содержите контейнер для линз в чистоте. Промывайте его свежим пероксидным раствором и оставляйте открытым на просушку. К каждому набору пероксидной системы прилагается новый контейнер для линз.
8. Не переливайте раствор в другую емкость.
9. Не используйте раствор, если контрольная пломба на колпачке или флакон повреждены.
10. Раствор следует использовать в течение двух месяцев с момента открытия флакона в пределах срока годности (см. штамп на упаковке).
11. Никогда не используйте бывший в употреблении раствор и не смешивайте растворы из разных упаковок.
12. Не касайтесь внутренней поверхности крышки флакона во избежание попадания частиц и микроорганизмов в раствор.
13. Тщательно закрывайте флакон после использования и храните его при комнатной температуре (15-30°C).
14. Никогда не промывайте контактные линзы и контейнер под проточной водой.
15. Оберегайте флакон от холода и держите его вдали от прямых солнечных лучей. Храните в недоступном для детей месте.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Раствор OKVision® ONE STEP® не имеет специфических противопоказаний. Не используйте, если вы страдаете аллергией на какой-либо из компонентов. При возникновении раздражения или неприятных ощущений в глазах немедленно снимите контактные линзы, промойте глаза под проточной водой и обратитесь к офтальмологу.

СОСТАВ:

Перекись водорода 3% (H_2O_2), ЭДТА и ПВП в фосфатно-буферном солевом растворе.



Производитель:
ООО «Окей Винин Технологии»,
141981 Россия, Московская область,
г. Дубна, ул. Большеволжская, дом 15.
РУ №
OKVision® – зарегистрированный
товарный знак, свидетельство
№ 561234 от 30.12.2015

OKVISION

ONE STEP+

Одноступенчатая перекисидная система для ухода и хранения линз

OKVISION

Эффективно и безопасно

ONE STEP+

Одноступенчатая перекисидная система для ухода и хранения линз OKVision® ONE STEP+

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ


100 мл +контейнер

Одноступенчатая перекисидная система для ухода и хранения линз OKVision® ONE STEP+ для мытья и дезинфекции всех типов контактных линз (мягких гидрогелевых и жестких гидрогелевых, жестких силиконовых гидрогелевых, жестких и мягких силиконовых гидрогелевых, жестких и мягких силиконовых гидрогелевых, жестких и мягких силиконовых гидрогелевых). Не содержит консервантов. Контейнер, оснащенный дисками-нейтрализаторами, нейтрализует перекись водорода за 6 часов. Водонепроницаемый в системе полимеризации (PVP) придает раствору уникальные свойства.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Тщательно вымойте руки с мылом под проточной водой и высушите их.
2. Перекисидную систему следует использовать с оригинальным контейнером, оснащенным дисками-нейтрализаторами. Никогда не используйте другой контейнер.
3. Достаньте держатель для линз из контейнера. Убедитесь, что диск-нейтрализатор закреплен на дне контейнера. Снимите линзу с правого глаза и поместите ее в держатель на помеченный буквой «R» ярус. Сложите левую с правой линзу и поместите ее на ярус с пометкой «L». Закройте крышку держателя, стараясь не задеть линзы.
4. Тщательно промойте каждую линзу в держателе под равной перекисидной системой в течение 5 секунд.
5. После того как вы промыли линзы, налейте раствор в контейнер до указанной линии. Затем поместите держатель линз в контейнер и закройте его. Не трясите и не перемешивайте контейнер.
6. Держите контейнер в вертикальном положении. Оставьте линзы в растворе на ночь, однако не менее чем на 6 часов для полной нейтрализации раствора.
7. Снимите линзы с держателя. При замене, перед тем как надеть линзы, ополосните их физиологическим раствором.
8. Вылейте использованный раствор из контейнера. Для того чтобы сделать замену на контейнер, промойте держатель линз и контейнер свежим перекисидной системой и дайте высохнуть в вертикальном положении. Сушите держатель отдельно от контейнера.
9. Если вы не планируете надевать линзы сразу после обработки, не можно оставить в держателе контейнера до 3-х дней. Если линзы оставить в растворе более 3-х дней, то перед тем как их надеть, повторите процедуру обработки еще раз, используя для этого свежий перекисидной раствор.

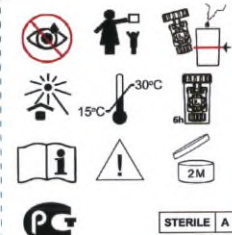

STERILE A

OKVISION

Эффективно и безопасно

ONE STEP+

Одноступенчатая перекисидная система для ухода и хранения линз OKVision® ONE STEP+

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

100 мл +контейнер

Для хранения линз и других изделий с линз можно использовать дополнительные очищающие средства, если это рекомендовано офтальмологом.

ВАЖНО:

1. Раствор следует всегда использовать с оригинальным контейнером, оснащенным дисками-нейтрализаторами. Никогда не используйте другой контейнер.
2. Перекись водорода является очень эффективным дезинфицирующим раствором. Раствор, который не был использован, при попадании в глаза вызывает ожог. Если вы случайно влили линзы из впитывающего раствора, немедленно снимите их и обильно промойте глаза стерильным физиологическим раствором или чистой водой.
3. Никогда не наносите на нейтральный перекисидной раствор прямо на глаза. Раствор нейтрализуется до прищипывания для тех случаев, когда в глаза попал раствор, но вы надели его в контейнер с дисками-нейтрализаторами.
4. Для того чтобы использование линз было безопасным, перед применением проконсультируйтесь с офтальмологом. Следуйте инструкциям и соблюдайте рекомендации офтальмолога для парения. Безопасный и эффективный использование контактных линз.
5. Небольшое количество раствора на линзах.
6. Во время обработки держите контейнер вертикально.
7. Вода снижает эффективность для линз в течение. Примените это свежий перекисидной системой и установите стандарт на прищипывание. И каждую неделю перекисидной системы прищипывания контейнер для линз.
8. Не перемешивайте раствор в другой емкости.
9. Не используйте раствор, если жидкая линза на контейнере или флаконе повреждена.
10. Раствор следует использовать в течение двух недель с момента открытия флакона в течение срока годности (или иначе на упаковке).
11. Никогда не используйте флакон в упаковке раствор и не смешивайте растворы на разных этапах.
12. Не касайтесь внутренней поверхности крышки флакона или обильно промойте крышку и контейнер в растворе.
13. Тщательно мойте флакон после использования и храните его при комнатной температуре (15-30°C).
14. Никогда не применяйте контактные линзы и контейнер под прямой водой.
15. Обработайте флакон от жидкости и держите его края от прямых солнечных лучей. Храните в недоступном для детей месте.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Раствор OKVision® ONE STEP+ не имеет специфических противопоказаний. Не используйте, если вы страдаете аллергией на какой-либо из компонентов. При использовании раздражении или неприятных ощущениях и/или непереносимости снимите контактные линзы, промойте глаза чистой водой и обратитесь к офтальмологу.

СОСТАВ:

Перекись водорода 3% (H₂O₂), ЗЕТА и ПВП в физиологическом растворе.

Производитель:

ООО «Окей Вижн Текнолоджи»,
141161, Россия, Московская область,
г. Дубна, ул. Солнцевская, дом 15,
РФ 15
OKVision® - зарегистрированный
товарный знак, свидетельство
№ 561234 от 10.12.2015



6 420618 265037

OKVISION ONE STEP+

Одноступенчатая перекисидная
система для ухода и хранения линз

OKVISION
Одноступенчатая перекисидная
система для ухода и хранения линз

Эффективно
и безопасно

ONE STEP+

Одноступенчатая перекисидная система
для ухода и хранения линз OKVision® ONE STEP+

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

100 мл (x2)
+контейнер

Одноступенчатая перекисидная система для ухода и хранения линз OKVision® ONE STEP+ для ухода и хранения линз. Система предназначена для ухода и хранения линз. Система предназначена для ухода и хранения линз. Система предназначена для ухода и хранения линз.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Проверьте срок годности и целостность упаковки.
2. Проверьте, чтобы в системе не было влаги.
3. Проверьте, чтобы в системе не было влаги.
4. Проверьте, чтобы в системе не было влаги.
5. Проверьте, чтобы в системе не было влаги.
6. Проверьте, чтобы в системе не было влаги.
7. Проверьте, чтобы в системе не было влаги.
8. Проверьте, чтобы в системе не было влаги.
9. Проверьте, чтобы в системе не было влаги.
10. Проверьте, чтобы в системе не было влаги.



Эффективно
и безопасно

ONE STEP+

Одноступенчатая перекисидная система
для ухода и хранения линз OKVision® ONE STEP+

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

100 мл (x2)
+контейнер

Для зрения больше и лучше используйте 1 или более
систем OKVision® ONE STEP+ для ухода и хранения линз.

ВНИМАНИЕ:

1. Система не должна использоваться для хранения линз.
2. Система не должна использоваться для хранения линз.
3. Система не должна использоваться для хранения линз.
4. Система не должна использоваться для хранения линз.
5. Система не должна использоваться для хранения линз.
6. Система не должна использоваться для хранения линз.
7. Система не должна использоваться для хранения линз.
8. Система не должна использоваться для хранения линз.
9. Система не должна использоваться для хранения линз.
10. Система не должна использоваться для хранения линз.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Система OKVision® ONE STEP+ не рекомендуется использовать для хранения линз, которые не предназначены для использования с системой.

СОСТАВ:

Система OKVision® ONE STEP+ состоит из 100 мл (x2) + контейнер.

Производитель:
ООО «Сейл Визн» (Сейл Визн),
г. Дубна, ул. Дзержинского, д. 12,
190000.
OKVision® - зарегистрированный
торговой знак, принадлежащий
ООО «Сейл Визн».

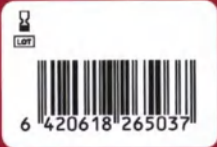

OKVISION® ONE STEP+

Одноступенчатая пероксидная
система для ухода и хранения линз

OKVISION®
ВЫБОР ЛУЧШЕГО ДЛЯ ВАШЕГО

Эффективно
и безопасно

ONE STEP+

Одноступенчатая
пероксидная система
для ухода и хранения линз
OKVision® ONE STEP+

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

250 мл
+контейнер

Одноступенчатая пероксидная система для ухода и хранения линз OKVision® ONE STEP+ для очистки и дезинфекции всех типов контактных линз (включая гидрогелевые и силикон-гидрогелевые, жесткие газопроницаемые оксифенолы, респективные и ортокератологические, гибридные). Не содержит консервантов. Контейнер, оснащенный диспенсер-нейтрализатором, нейтрализует перекись водорода за 6 часов. Входящий в состав полумембранный диспенсер (PVT) придает раствору увлажняющие свойства.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Тщательно вымойте руки с мылом под проточной водой и высушите их.
2. Перекладывайте линзы в контейнер, используя оригинальный диспенсер, оснащенный диспенсер-нейтрализатором. Никогда не используйте другой контейнер.
3. Достаньте линзу для линзы из контейнера. Убедитесь, что диспенсер-нейтрализатор закреплен на дне контейнера. Снимите линзу с правой глаза и поместите ее в держатель на левый бокорез. Снимите линзу с левого глаза и поместите ее на бокорез с правой «L». Закрыйте крышку держателя, стараясь не задеть линзы.
4. Тщательно промойте каждую линзу в держателе под проточной водой в течение 3 секунд.
5. После того как вы промyli линзы, налейте раствор в контейнер до указанной линии. Затем поместите держатель линзы в контейнер и закройте его. Не трогайте и не перемешивайте контейнер.
6. Держите контейнер в вертикальном положении. Оставьте линзы в растворе на ночь, однако не менее чем на 6 часов для полной нейтрализации раствора.
7. Снимите линзы с держателя. При желании, перед тем как надеть линзы, ополосните их физиологическим раствором.
8. Вылейте использованный раствор из контейнера. Для того чтобы удалить загрязнения из контейнера, промойте держатель линзы и контейнер физиологическим раствором и дайте просохнуть в перевернутом положении. Сушите держатель отдельно от контейнера.
9. Если вы не планируете надеть линзы сразу после обработки, их можно оставить в закрытом контейнере до 3-х дней. Если линзы остаются в растворе более 3-х дней, то перед тем как их надеть, проведите процедуру обработки еще раз, используя для этого свежий пероксидный раствор.



OKVISION®
ВЫБОР ЛУЧШЕГО ДЛЯ ВАШЕГО

Эффективно
и безопасно

ONE STEP+

Одноступенчатая
пероксидная система
для ухода и хранения линз
OKVision® ONE STEP+

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

250 мл
+контейнер

Для удаления белка и других загрязнений с линз можно использовать дополнительное оптическое средство, если его рекомендовало офтальмолог.

ВАЖНО:

1. Раствор следует использовать с оригинальным контейнером, оснащенный диспенсер-нейтрализатором. Никогда не используйте другой контейнер.
2. Перекись водорода является очень агрессивным дезинфицирующим раствором. Раствор, который не был нейтрализован, при попадании в глаза вызывает ожоги. Если вы случайно оставите линзы из жесткого материала, немедленно снимите их и обильно промойте глаза стерильным физиологическим раствором или чистой водой.
3. Никогда не касайтесь не нейтрализованный пероксидный раствор прямо к глазу. Раствор нейтрализуется до пригодного для глаз состояния спустя 6 часов после того, как вы налили его в контейнер с диспенсер-нейтрализатором.
4. Для того чтобы использование линз было безопасным, перед применением проконсультируйтесь с офтальмологом. Следуйте инструкциям и соблюдайте рекомендации офтальмолога для гарантии безопасного и правильного использования контактных линз.
5. Наблюдайте помехи раствора на ткани.
6. Во время обработки держите контейнер вертикально.
7. Всегда закрывайте контейнер для линз в чистоте. Промойте его свежим физиологическим раствором и оставьте открытым на просушку. В каждый набор пероксидной системы прилагается новый контейнер для линз.
8. Не перемешивайте раствор в другой емкости.
9. Не используйте раствор, если контрольная пломба не intact или если флакон поврежден.
10. Раствор следует использовать в течение двух месяцев с момента открытия флакона в пределах срока годности (см. этикетку на упаковке).
11. Никогда не используйте бывший в употреблении раствор и не смешивайте растворы на разных этапах.
12. Не касайтесь внутренней поверхности крышки флакона во избежание попадания частиц и микробов в раствор.
13. Тщательно закрывайте флакон после использования и храните его при комнатной температуре (15-30°C).
14. Никогда не промывайте контактные линзы в контейнер под проточной водой.
15. Оберегайте флакон от холода и держите его подальше от прямых солнечных лучей, храните в недоступном для детей месте.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Раствор OKVision® ONE STEP+ не имеет специфических противопоказаний. Не используйте, если вы страдаете аллергией на какой-либо из компонентов. При возникновении раздражения или неприятных ощущений в глазах немедленно снимите контактные линзы, промойте глаза под проточной водой и обратитесь к офтальмологу.

СОСТАВ:

Перекись водорода 3% (H₂O₂), ЗДА и ПВИ в фосфатно-буферном солевом растворе.

Производитель:

ООО «Опал Вексел Технолоджи»,
141181 Россия, Московская область,
г. Дубна, ул. Бельшивецкая, д. 15.
Р/У №

OKVision® – зарегистрированный
товарный знак, свидетельство
№ 561234 от 30.12.2015



6 420618 265037

OKVISION ONE STEP+

Одноступенчатая перекисидная система для ухода и хранения линз

OKVISION

Эффективно
и безопасно

ONE STEP+

Одноступенчатая перекисидная система для ухода и хранения линз OKVision® ONE STEP+

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

250 мл (x2)
+контейнер

Применение перекисидной системы для ухода и хранения линз OKVision® ONE STEP+ для ежедневного применения линз, разработана и клинически доказана, что она эффективно удаляет белесые налеты, улучшает кислородную проницаемость, снижает риск развития инфекционных заболеваний, повышает комфорт при ношении линз, улучшает зрение и повышает качество жизни пользователя. Система разработана для ежедневного применения линз, разработана и клинически доказана, что она эффективно удаляет белесые налеты, улучшает кислородную проницаемость, снижает риск развития инфекционных заболеваний, повышает комфорт при ношении линз, улучшает зрение и повышает качество жизни пользователя.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Тщательно вымойте руки с мылом под проточной водой и вытрите их.
2. Подготовьте систему: слейте старый раствор и наполните систему свежим раствором. Для этого необходимо снять крышку системы и налить раствор. Для этого необходимо снять крышку системы и налить раствор. Для этого необходимо снять крышку системы и налить раствор.
3. После того как вы наполнили систему, закройте крышку системы и встряхните ее. Для этого необходимо встряхнуть систему. Для этого необходимо встряхнуть систему. Для этого необходимо встряхнуть систему.
4. Вставьте линзы в систему и оставьте их на 6 часов. Для этого необходимо вставить линзы в систему и оставить их на 6 часов. Для этого необходимо вставить линзы в систему и оставить их на 6 часов.
5. После того как вы вынули линзы из системы, промойте их чистой водой. Для этого необходимо промыть линзы чистой водой. Для этого необходимо промыть линзы чистой водой.
6. После того как вы вынули линзы из системы, промойте их чистой водой. Для этого необходимо промыть линзы чистой водой. Для этого необходимо промыть линзы чистой водой.
7. После того как вы вынули линзы из системы, промойте их чистой водой. Для этого необходимо промыть линзы чистой водой. Для этого необходимо промыть линзы чистой водой.



STERILE A

OKVISION

Эффективно
и безопасно

ONE STEP+

Одноступенчатая перекисидная система для ухода и хранения линз OKVision® ONE STEP+

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

250 мл (x2)
+контейнер

Для ежедневного применения линз, разработана и клинически доказана, что она эффективно удаляет белесые налеты, улучшает кислородную проницаемость, снижает риск развития инфекционных заболеваний, повышает комфорт при ношении линз, улучшает зрение и повышает качество жизни пользователя.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Тщательно вымойте руки с мылом под проточной водой и вытрите их.
2. Подготовьте систему: слейте старый раствор и наполните систему свежим раствором. Для этого необходимо снять крышку системы и налить раствор. Для этого необходимо снять крышку системы и налить раствор. Для этого необходимо снять крышку системы и налить раствор.
3. После того как вы наполнили систему, закройте крышку системы и встряхните ее. Для этого необходимо встряхнуть систему. Для этого необходимо встряхнуть систему. Для этого необходимо встряхнуть систему.
4. Вставьте линзы в систему и оставьте их на 6 часов. Для этого необходимо вставить линзы в систему и оставить их на 6 часов. Для этого необходимо вставить линзы в систему и оставить их на 6 часов.
5. После того как вы вынули линзы из системы, промойте их чистой водой. Для этого необходимо промыть линзы чистой водой. Для этого необходимо промыть линзы чистой водой.
6. После того как вы вынули линзы из системы, промойте их чистой водой. Для этого необходимо промыть линзы чистой водой. Для этого необходимо промыть линзы чистой водой.
7. После того как вы вынули линзы из системы, промойте их чистой водой. Для этого необходимо промыть линзы чистой водой. Для этого необходимо промыть линзы чистой водой.



STERILE A



OKVISION
технология для вас

ONE STEP+

Одноступенчатая перекисидная система для ухода и хранения линз

OKVISION
технология для вас

Эффективно
и безопасно

ONE STEP+

Одноступенчатая перекисидная система для ухода и хранения линз OKVision® ONE STEP+

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

360 мл
+контейнер

Одноступенчатая перекисидная система для ухода и хранения линз OKVision® ONE STEP+ для очистки и дезинфекции всех типов контактных линз (мягких гидрогелевых и силикон-гидрогелевых, жестких газопроницаемых склеральных, роговичных и ортокератомических, гибридных). Не содержит консервантов. Контейнер, оснащенный диском-нейтрализатором, нейтрализует перекись водорода за 6 часов. Воздух в составе поливинилпирролидона (PVP) придает раствору увлажняющие свойства.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Тщательно вымойте руки с мылом под проточной водой и высушите их.
2. Перекисидную систему следует всегда использовать с оригинальным контейнером, оснащенным диском-нейтрализатором. Никогда не используйте другой контейнер.
3. Достаньте держатель для линз из контейнера. Убедитесь, что диск-нейтрализатор закреплен на дне контейнера. Снимите линзу с правого глаза и поместите ее в держатель на помеченный буквой «R» купол. Снимите линзу с левого глаза и поместите ее на купол с пометкой «L». Закройте крышку держателя, стараясь не зацепить линзы.
4. Тщательно промойте каждую линзу в держателе над раковиной перекисидным раствором в течение 5 секунд.
5. После того как вы промыли линзы, налейте раствор в контейнер до указанной линии. Затем поместите держатель линз в контейнер и закройте его. Не трясите и не переворачивайте контейнер.
6. Держите контейнер в вертикальном положении. Оставьте линзы в растворе на ночь, однако не менее чем на 6 часов для полной нейтрализации раствора.
7. Снимите линзы с держателя. При извлечении, перед тем как надеть линзы, ополосните их физиологическим раствором.
8. Вылейте использованный раствор из контейнера. Для того чтобы удалить загрязнения из контейнера, промойте держатель линз и контейнер свежим перекисидным раствором и дайте просохнуть в перевернутом положении. Сушите держатель отдельно от контейнера.
9. Если вы не планируете надевать линзы сразу после обработки, их можно оставить в закрытом контейнере до 3-х дней. Если линзы остались в растворе более 3-х дней, то перед тем как их надеть, проведите процедуру обработки еще раз, используя для этого свежий перекисидный раствор.



OKVISION
технология для вас

Эффективно
и безопасно

ONE STEP+

Одноступенчатая перекисидная система для ухода и хранения линз OKVision® ONE STEP+

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

360 мл
+контейнер

Для удаления белков и других загрязнений с линз можно использовать дополнительные очищающие средства, если это рекомендовано офтальмологом.

ВАЖНО:

1. Раствор следует всегда использовать с оригинальным контейнером, оснащенным диском-нейтрализатором. Никогда не используйте другой контейнер.
2. Перекись водорода является очень эффективным дезинфицирующим раствором. Раствор, который не был нейтрализован, при попадании в глаза вызывает конъюнктивит. Если вы случайно оставите линзы из этого раствора, немедленно снимите их и обильно промойте глаза стерильным физиологическим раствором или питьевой водой.
3. Никогда не наносите на нейтрализованный перекисидный раствор прямо на глаза. Раствор нейтрализуется до пригодного для глаз состояния спустя 6 часов после того, как вы налили его в контейнер с диском-нейтрализатором.
4. Для того чтобы использование линз было безопасным, перед применением проконсультируйтесь с офтальмологом. Следуйте настоящим инструкциям и соблюдайте рекомендации офтальмолога для гарантии безопасного и правильного использования контактных линз.
5. Небольшое попадание раствора на кожу.
6. Во время обработки держите контейнер вертикально.
7. Всегда содержите контейнер для линз в чистоте. Промывайте его свежим перекисидным раствором и оставляйте открытым на воздухе. К каждому набору перекисидной системы прилагается новый контейнер для линз.
8. Не переливайте раствор в другую емкость.
9. Не используйте раствор, если контрольная полоска на крышке или флаконе пожелтела.
10. Раствор следует использовать в течение двух месяцев с момента открытия флакона в пределах срока годности (см. этикетку на упаковке).
11. Никогда не используйте бывший в употреблении раствор и не смешивайте растворы из разных упаковок.
12. Не касайтесь внутренней поверхности крышки флакона во избежание попадания частиц и микроорганизмов в раствор.
13. Тщательно вымойте флакон после использования и храните его при комнатной температуре (15-30°C).
14. Никогда не промывайте контактные линзы и контейнер под проточной водой.
15. Оберните флакон от холода и держите его вдаль от прямых солнечных лучей. Храните в недоступном для детей месте.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Раствор OKVision® ONE STEP+ не имеет специфических противопоказаний. Не используйте, если вы страдаете аллергией на какой-либо из компонентов. При возникновении раздражения или неприятных ощущений в глазах немедленно снимите контактные линзы, промойте глаза под проточной водой и обратитесь к офтальмологу.

СОСТАВ:

Перекись водорода 3% (H₂O₂), 302A и ПВП в фосфатно-буферном солевом растворе.



Производитель:
ООО «Окей Визн Технологии»,
141981 Россия, Московская область,
г. Дубна, ул. Богусеволокская, дом 15.
РФ №
OKVision® – зарегистрированный
товарный знак, свидетельство
№ 561234 от 30.12.2015



6 420618 265037

2. Макет этикетки на флаконе



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ!

Пероксидная система для эффективной очистки, дезинфекции, нейтрализации и хранения всех типов контактных линз. Не содержит консервантов.

Важно!

1. Внимательно прочитайте инструкции перед использованием. Держать вдали от детей.
2. Никогда не наносите не нейтрализованный (активный) раствор прямо на глаза.
3. Снимите контактные линзы и поместите их в держатель контейнера. Заполните контейнер OKVision® ONE STEP+ раствором OKVision® ONE STEP+ до линии на контейнере, не переполняйте его (см. изображение). Поместите держатель и аккуратно закройте его.
4. Всегда используйте только контейнер OKVision® ONE STEP+.
5. Держите линзы в растворе не менее 6 часов для нейтрализации раствора.
6. Не используйте раствор OKVision® ONE STEP+ для споласкивания линз перед использованием. При необходимости используйте для споласкивания стерильный физраствор.

Состав: 3% перекиси водорода (H_2O_2), ЭДТА и ПВП в фосфатно-солевом растворе.



Производитель:

ООО «Окей Вижн Технологии»,
141981 Россия, Московская область,
г. Дубна, ул. Большеволжская, дом 15.
РУ №

OKVision® – зарегистрированный
товарный знак, свидетельство
№ 561234 от 30.12.2015



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ!

Пероксидная система для эффективной очистки, дезинфекции, нейтрализации и хранения всех типов контактных линз. Не содержит консервантов.

Важно!

1. Внимательно прочитайте инструкции перед использованием. Держать вдали от детей.
2. Никогда не наносите не нейтрализованный (активный) раствор прямо на глаза.
3. Снимите контактные линзы и поместите их в держатель контейнера. Заполните контейнер OKVision® ONE STEP+ раствором OKVision® ONE STEP+ до линии на контейнере, не переполняйте его (см. изображение). Поместите держатель и аккуратно закройте его.
4. Всегда используйте только контейнер OKVision® ONE STEP+.
5. Держите линзы в растворе не менее 6 часов для нейтрализации раствора.
6. Не используйте раствор OKVision® ONE STEP+ для споласкивания линз перед использованием. При необходимости используйте для споласкивания стерильный физраствор.

Состав: 3% перекиси водорода (H_2O_2), ЭДТА и ПВП в фосфатно-солевом растворе.



Производитель:

ООО «Окей Вижн Технологии»,
141981 Россия, Московская область,
г. Дубна, ул. Большеволжская, дом 15.
РУ №

OKVision® – зарегистрированный
товарный знак, свидетельство
№ 561234 от 30.12.2015



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ!

Перекисидная система для эффективной очистки, дезинфекции, нейтрализации и хранения всех типов контактных линз. Не содержит консервантов.

Важно!

1. Внимательно прочитайте инструкции перед использованием. Держать вдали от детей.
2. Никогда не наносите не нейтрализованный (активный) раствор прямо на глаза.
3. Снимите контактные линзы и поместите их в держатель контейнера. Заполните контейнер OKVision® ONE STEP+ раствором OKVision® ONE STEP+ до линии на контейнере, не переполняйте его (см. изображение). Поместите держатель и аккуратно закройте его.
4. Всегда используйте только контейнер OKVision® ONE STEP+.
5. Держите линзы в растворе не менее 6 часов для нейтрализации раствора.
6. Не используйте раствор OKVision® ONE STEP+ для споласкивания линз перед использованием. При необходимости используйте для споласкивания стерильный физраствор.

Состав: 3% перекиси водорода (H_2O_2), ЭДТА и ПВП в фосфатно-солевом растворе.




STERILE A

Производитель:
ООО «Окей Вижн Технологии»,
141981 Россия, Московская область,
г. Дубна, ул. Большеволжская, дом 15.
РУ №
OKVision® – зарегистрированный
товарный знак, свидетельство
№ 561234 от 30.12.2015


3. Флакон



Крышка

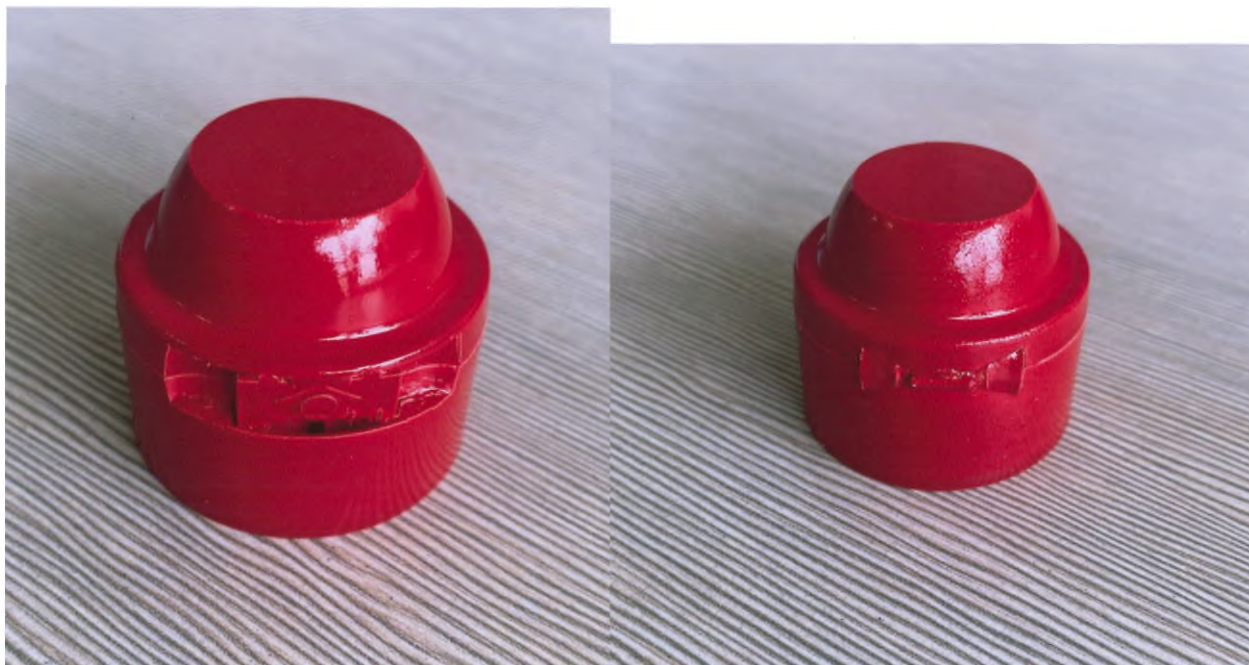

4. Контейнер

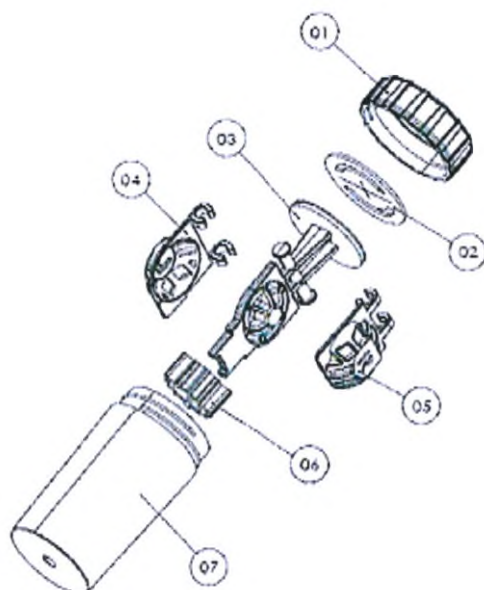

- 01 – крышка;
- 02 - уплотнительное кольцо;
- 03, 04, 05 – держатели для линз;
- 06 – диск-нейтрализатор;
- 07 – контейнер.



Держатель для линз



Прошито, пронумеровано и скреплено

Печатью 16 (шестнадцать)

листов

Генеральный директор

ООО «Окей Вижен Технологии»

Ядыкин А.А.

