



Утверждаю

Исполнительный директор ОАО "Синтез"

В.Г.Пшеничников

2008 г.

Инструкция по применению контейнера полимерного для крови и ее компонентов с двумя консервирующими растворами «Глюгидир»/ «ЭРНАФ»

«Гемасин» 500/400/400/400

ТУ 9398-062-00480201-2006

Взятие крови

1 Проверьте целостность внутреннего пакета. Вскройте пакет. Убедитесь в отсутствии мутности гемоконсервантов. Проверьте срок годности и герметичность контейнера, обращая внимание на отсутствие растворов выше мембран штуцеров емкости и узлов герметизации.

2 Произведите забор 400 мл донорской крови в основную емкость с гемоконсервантом «Глюгидир» согласно действующей инструкции по заготовке и консервированию донорской крови, утвержденной Минздравом РФ.

Предупреждение: Во избежание воздушной эмболии не сдавливайте контейнер во время процедуры кроводачи.

3 Интенсивно перемешивайте кровь с гемоконсервантом во время кроводачи и непосредственно сразу после нее.

4 Загерметизируйте донорскую трубку ближе к контейнеру. При необходимости отбора проб цельной консервированной крови для определения группы крови или совместимости, передавите кровь из донорской трубки в контейнер, перемешайте и вновь наполните донорскую трубку, затем повторите процедуру еще один раз. Загерметизируйте донорскую трубку в нескольких местах для получения необходимого количества образцов цельной крови.

5 Навесьте флаконы-спутники на емкость, вставив их в отверстия верхнего сварного шва.

6 Контейнеры с донорской кровью и прикрепленными к ним флаконами-спутниками вертикально установите в металлические сетки и в возможно короткий срок перенесите на хранение при температуре 4°C или на фракционирование крови.

Примечание – Время перевода эритроцитов в раствор «ЭРНАФ®» может варьироваться в зависимости от выбранного процесса заготовки крови:

- а) после центрифугирования свежезаготовленной крови;
- б) в течение 8 ч после забора крови, если заготавливаются тромбоциты;
- в) в течение 72 ч после забора крови, если кровь была сразу заморожена.



Утверждаю

Исполнительный директор ОАО "Синтез"

В.Г.Пшеничников

2008 г.

Инструкция по применению контейнера полимерного для крови и ее
компонентов с двумя консервирующими растворами «Глюгидир»/ «ЭРНАФ®»
«Гемасин» 500/400/400
ТУ 9398-062-00480201-2006

Взятие крови

1 Проверьте целостность внутреннего пакета. Вскройте пакет. Убедитесь в отсутствии мутности гемоконсервантов. Проверьте срок годности и герметичность контейнера, обращая внимание на отсутствие растворов выше мембран штуцеров емкости и узлов герметизации.

2 Произведите забор 400 мл донорской крови в основную емкость с гемоконсервантом «Глюгидир» согласно действующей инструкции по заготовке консервированию донорской крови, утвержденной Минздравом РФ.

Предупреждение: Во избежание воздушной эмболии не сдавливайте контейнер во время процедуры кроводачи.

3 Многократно и интенсивно перемешивайте кровь с гемоконсервантом во время кроводачи и непосредственно сразу после нее.

4 Загерметизируйте донорскую трубку ближе к контейнеру. При необходимости отбора проб цельной консервированной крови для определения группы крови или совместимости, передавите кровь из донорской трубки в контейнер, перемешайте и вновь наполните донорскую трубку, затем повторите процедуру еще один раз. Загерметизируйте донорскую трубку в нескольких местах для получения необходимого количества образцов цельной крови.

5 Навесьте флаконы-спутники на емкость, вставив их в отверстия верхнего сварного шва.

6 Контейнеры с донорской кровью и прикрепленными к ним флаконами-спутниками вертикально установите в металлические сетки и в возможно короткий срок перенесите на хранение при температуре 4 °С или на фракционирование крови.

Примечание – Время перевода эритроцитов в раствор «ЭРНАФ®» может варьироваться в зависимости от выбранного процесса заготовки крови:

- а) после центрифугирования свежезаготовленной крови;
- б) в течение 8 ч после забора крови, если заготавливаются тромбоциты;
- в) в течение 72 ч после забора крови, если кровь была сразу заморожена.

Фракционирование крови на компоненты

1 В центрифужный стакан поместите контейнер с кровью, упакованный полимерный пакет так, чтобы трубки находились в верхней части. Зафиксируйте их липкой лентой. Центрифугируйте в соответствии с инструкцией по получению компонентов, утвержденной Минздравом РФ.

2 Поместите емкость с компонентами в плазмаэкстрактор. Сломайте заглушку узла герметизации данной емкости. Переместите плазму в пустую емкость без раствора для хранения плазмы.

3 Пережмите трубку емкости с плазмой.

4 Сломайте заглушку узла герметизации емкости с раствором «ЭРНАФ®».

5 Переведите раствор «ЭРНАФ®» в емкость с эритроцитами. Тщательно перемешайте раствор с концентратом эритроцитов.

6 Загерметизируйте трубку на взвеси эритроцитов в 2-х местах. Произведите маркировку емкости, отделите емкость с эрвзвесью, разрезав трубку между заваренными участками, избегая пролива жидкости.

7 В центрифужный стакан поместите емкость с плазмой и пустую емкость из под раствора «ЭРНАФ®». Получите компонент крови согласно инструкции к получению компонентов крови, утвержденной Минздравом РФ.

8 Поместите емкость с компонентами в плазмаэкстрактор, снимите зажимы трубки, переведите компонент крови в пустую емкость. Промаркируйте емкость компонентами крови, загерметизируйте трубку, отделите емкости друг от друга.

Обратите внимание:

1 Заготовленную эритроцитную массу с раствором «ЭРНАФ®» следует хранить не более 35 дней при температуре от 2 до 6 °С. Для дальнейшей переработки использовать стандартные методы.

2 Полученные компоненты крови необходимо хранить в соответствии с инструкциями по их хранению, утвержденными Минздравом РФ.

3 Нельзя смешивать компоненты крови, заготовленные с помощью «Глюгидир»/ «ЭРНАФ®» с другими лекарственными средствами.

4 Переливайте кровь и её компоненты через устройство для переливания крови и ее компонентов из контейнеров типа ПК 22-02 ТУ 9398-059-00480201-2003 или устройство для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов типа ПК 23-07 ТУ 9398-032-00480201-2003 или через устройство с крофилтром ТУ 9398-023-00480201-2007.