



Фото 1. Набор реагентов ПОЛИВИР HBV, вариант исполнения "Качественный"

Вкладыш к набору ПОЛИВИР HBV Качественный

Номер серии набора 02/1802/20

Дата изготовления 08.04.2020 Годен до 08.04.2022

Номер серии ПКО 270120

Дата изготовления 27.01.2020 Годен до 27.01.2022

Положительный контрольный образец представляет собой смесь ДНК-мишени генома HBV и внутреннего контроля (ВКО).

Наименование ДНК-мишени	Допустимый диапазон Ct
HBV	13 - 17

ПАМЯТКА

по применению набора реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса гепатита В методом полимеразной цепной реакции ПОЛИВИР HBV Качественный.

Набор реагентов ПОЛИВИР HBV Качественный предназначен для выявления ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B Virus, HBV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридоизотермической флуоресцентной детекцией в пробах нулевых кислот (НК), выделенных из клинических образцов (плазма и сыворотка крови).

1. Подготовка к проведению амплификации.


Маркировка пробирок на крышке **недопустима!** Пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Приготовить необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного контрольного образца и отрицательного контрольного образца этапа ПЦР (СКО-ПЦР) и, при наличии, этапа выделения (СКО-выделения).

1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.

1.3. Из компонентов набора приготовить амплификационную смесь из расчета на 1 пробу:

Компонент	Количество (мл)
Разбавитель	20

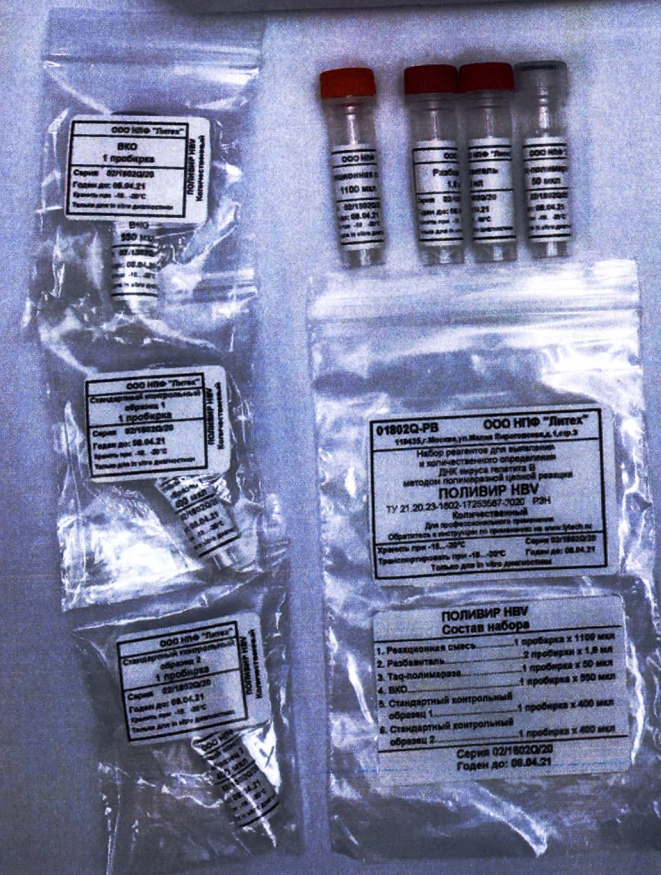

Вкладыш

к набору ПОЛИВИР HBV Количественный

Номер серии набора 02/1802Q/20

Дата изготовления 08.04.20 Годен до 08.04.21

Номер серии Стандартного контрольного образца 1 370120

Дата изготовления 27.01.2020 Годен до 27.01.2022

Номер серии Стандартного контрольного образца 2 370120

Дата изготовления 27.01.2020 Годен до 27.01.2022

Стандартный контрольный образец представляет собой количественно охарактеризованную смесь ДНК-калибраторов (образцов ДНК-мишеней генома HBV и внутреннего контроля известной концентрации).

Наименование образца	Наименование калибратора	Концентрация	Допустимый диапазон С _т

ПАМЯТКА

по применению набора реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса гепатита В методом полимеразной цепной реакции ПОЛИВИР HBV Количественный.

Набор реагентов ПОЛИВИР HBV Количественный предназначен для одновременного выявления и количественного определения ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B Virus, HBV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридно-флуоресцентной детекцией в пробках нулевых испол (Н-К), выделенных из клинических образцов (плазма и сыворотка крови).

1. Подготовка к проведению амплификации.

Маркировка пробирок на крышке недопустима! Пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Приготовить необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для стандартных контрольных образцов 1 и 2 и отрицательного контрольного образца этапа ПЦР (ОК-ПЦР) и, при наличии, этапа выделения (ОКД-выделения).

1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.

1.3. Из компонентов набора приготовить амплификационную смесь из расчета на 1 пробу:

Компонент	Количество (мкл)
Разбавитель	20
Реакционная смесь	10
Taq-полимераза	0,4

Фото 2. Набор реагентов ПОЛИВИР HBV, вариант исполнения "Количественный"



Фото 3. Набор реагентов **ПОЛИВИР НВУ**, Групповая упаковка

Прошито, проверено,
скреплено печатью.

Количество листов
шт.

Директор
Наумов А.Ю.





Фото 1. Набор реагентов ПОЛИВИР HBV, вариант исполнения "Качественный"

Вкладыш к набору ПОЛИВИР HBV Качественный

Номер серии набора 02/1802/20

Дата изготовления 08.04.2020 Годен до 08.04.2022

Номер серии ПКО 270120

Дата изготовления 27.01.2020 Годен до 27.01.2022

Положительный контрольный образец представляет собой смесь ДНК-мишени генома HBV и внутреннего контроля (ВКО).

Наименование ДНК-мишени	Допустимый диапазон Ct
HBV	13 - 17

ПАМЯТКА

по применению набора реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса гепатита В методом полимеразной цепной реакции ПОЛИВИР HBV Качественный.

Набор реагентов ПОЛИВИР HBV Качественный предназначен для выявления ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B Virus, HBV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридоанализом-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот (НК), выделенных из клинических образцов (плазма и сыворотка крови).

1. Подготовка к проведению амплификации.

Маркировка пробирок на крышке недопустима! Пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Приготовить необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного контрольного образца и отрицательного контрольного образца этапа ПЦР (СКО-ПЦР) и, при наличии, этапа выделения (СКО-выделения).

1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.

1.3. Из компонентов набора приготовить амплификационную смесь из расчета на 1 пробу:

Компонент	Количество (мл)
Разбавитель	20



Вкладыш

к набору ПОЛИВИР HBV Количественный

Номер серии набора 02/1802Q/20

Дата изготовления 08.04.20 Годен до 08.04.21

Номер серии Стандартного контрольного образца 1 370130

Дата изготовления 27.01.2020 Годен до 27.01.2023

Номер серии Стандартного контрольного образца 2 370130

Дата изготовления 27.01.2020 Годен до 27.01.2023

Стандартный контрольный образец представляет собой количественно охарактеризованную смесь ДНК-калибраторов (образцов ДНК-мишеней генома HBV и внутреннего контроля известной концентрации).

Наименование образца	Наименование калибратора	Концентрация	Допустимый диапазон С _т

ПАМЯТКА

по применению набора реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса гепатита В методом полимеразной цепной реакции ПОЛИВИР HBV Количественный.

Набор реагентов ПОЛИВИР HBV Количественный предназначен для одновременного выявления и количественного определения ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B Virus, HBV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресценционно-флуоресцентной детекцией в пробах мутноватых кислот (НК), выделенных из клинических образцов (плазма и сыворотка крови).

1. Подготовка к проведению амплификации.

Маркировка пробирок на крышке **необходима!** Пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Приготовить необходимое число безцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для стандартных контрольных образцов 1 и 2 и отрицательного контрольного образца этапа ПЦР (ОКО-ПЦР) и, при наличии, этапа выделения (ОКО-выделения).

1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.

1.3. Из компонентов набора приготовить амплификационную смесь из расчета на 1 пробу.

Компонент	Количество (мкл)
Разбавитель	20
Реакционная смесь	10
Таq-полимераза	0,4

Фото 2. Набор реагентов ПОЛИВИР HBV, вариант исполнения "Количественный"

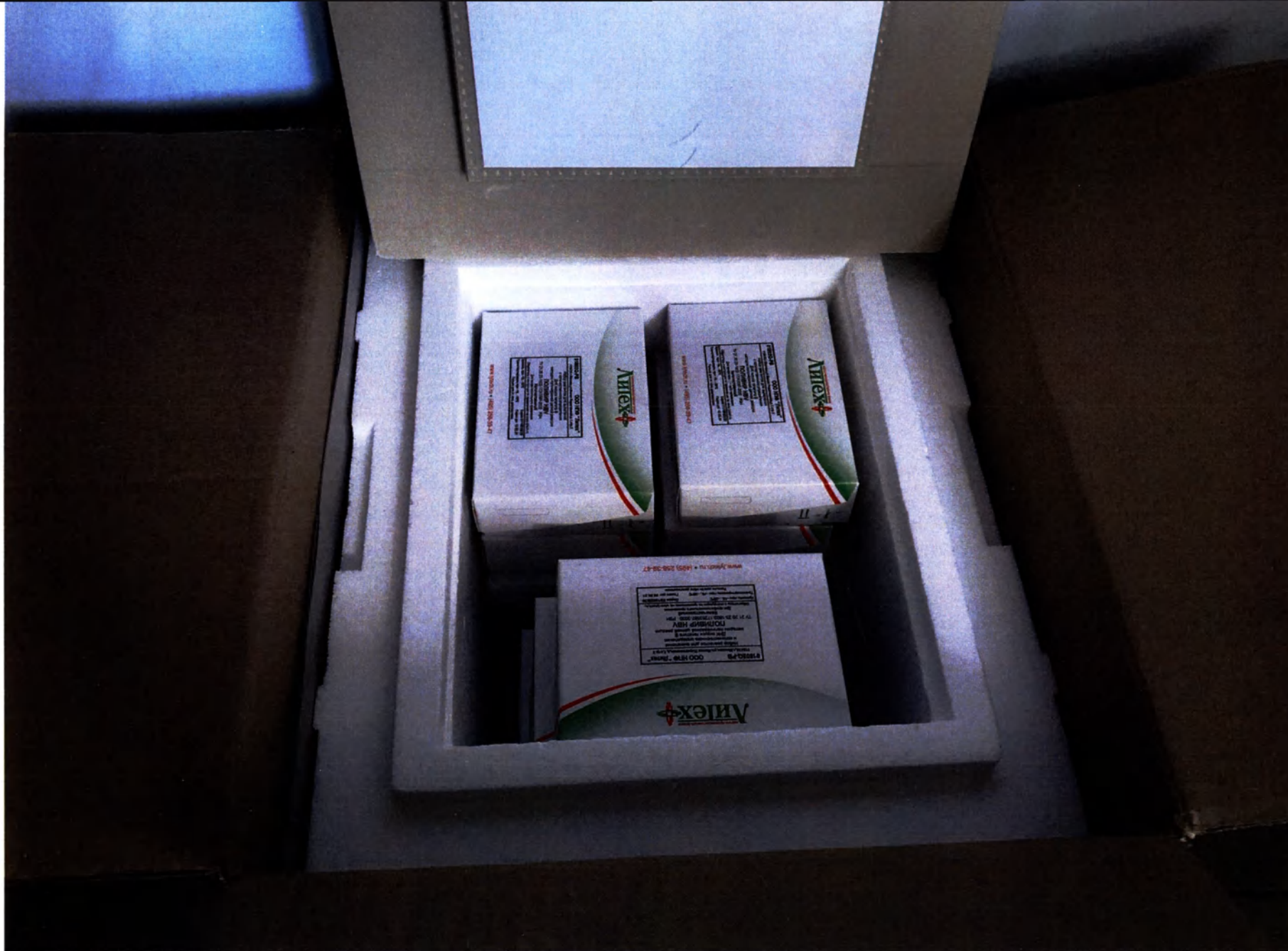


Фото 3. Набор реагентов ПОЛИВИР HBV, Групповая упаковка

Прошито, проверено,
скреплено печатью.

Количество листов

шт.

Директор

Наумов А.Ю.

