



**Общество с ограниченной ответственностью
«Лотос-Мед»**

420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лебедева, д.1, ИНН/КПП 1659123510/165901001,
ОГРН 1121690069291, в отделении БАНКА ТАТАРСТАН №8610, БИК 049205603,
К/С 3010181060000000063, Р/С 40702810262190004285, тел\факс 8(843) 204-35-92,
e-mail; ooo.lotos.med@gmail.com

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО "Лотос-Мед"

Ахметшин Р.Р.



Руководство по эксплуатации

**Комплект одежды и белья гинекологического, одноразовый,
стерильный**

1. Назначение изделия.

Комплект одежды и белья гинекологического, одноразовый, стерильный, предназначен для проведения малых гинекологических, хирургических и акушерских операций.

2. Основные технические характеристики:

Наименование, размеры, применяемые материалы, при производстве комплекта приведены в таблице 1. Технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Длина/Ширина/Толщина (мм.)	Название материала и его содержание в %	Размеры
1.	Простыня большая хирургическая	1400/2500/0,02	Полипропилен 100%	-
2.	Простыня малая хирургическая	2000/700/0,02	Полипропилен 100%	-
3.	Простыня с карманом (700-1500)х(1000-2500) мм;	700/1000/0,02-1500/2500/0,02	Полипропилен 100%	-
4.	Простыня большая хирургическая с липким краем	1400/2500/0,02	Полипропилен 100%	-
5.	Простыня малая операционная с липким краем	2000/700/0,02	Полипропилен 100%	-
6.	Простыня большая хирургическая с отверстием, с операционной пленкой, с карманом, липким краем и отводом (1400-3000)х(1400-4000) мм	1400/1400/0,02-3000/4000/0,02	Полипропилен 100%	-
7.	Салфетка впитывающая многослойная (400-600)х(600-900) мм	400/600/0,02-600/900/0,02	Вискоза 70% Полиэфир 30%	-
8.	Держатель шнура (20-300)х(300-2000) мм	20/300/0,02-300/2000/0,02	Полипропилен 100%	-
9.	Операционная лента (25-100)х(50-2000) мм	25/50/0,02-100/2000/0,02	Полипропилен 100%	-
10.	Чехол (10-400)х(50-3000) мм	10/50/0,02-400/3000/0,02	Полипропилен 100%	-
11.	Чехол на инструментальный стол (500-1200) х(700-1800) мм	500/700/0,02-1200/1800/0,02	Полипропилен 100%	-
12.	Полотенце (200-700)х(200-1000) мм;	200/200/0,02-700/1000/0,02	Вискоза 70% Полиэфир 30%	-
13.	Рубашка для роженицы	500/1400/0,02	Полипропилен 100%	-
14.	Тапочки	100/250/0,02	Полипропилен 100%	43
15.	Пеленка впитывающая	2000/700/0,02	Вискоза 70% Полиэфир 30%	-
16.	Прокладки женские впитывающие	140/300/2	Вискоза 70% Полиэфир 30%	-
17.	Бахилы низкие	540/370/0,02	Полипропилен 100%	-
18.	Бахилы высокие	540/250/0,02	Полипропилен 100%	-

Таблица 1 (продолжение)

№ п/п	Наименование	Длина/Ширина/ Толщина (мм.)	Название материала и его содержание в %	Разме ры
19.	Фартук	750/1200/0,04	Полипропилен 60% Полиэтилен 40%	-
20.	Халат	800/1700/0,02	Полипропилен 100%	50/52
21.	Маска медицинская	175/95/1	Полипропилен 100%	-
22.	Шапочка	300/180/0,02	Полипропилен 100%	-
23.	Трусики	300/180/0,02	Полипропилен 100%	50/52
Принадлежности:				
1.	Ложка Фолькмана	5/95/3	Полистирол 100%	-
2.	Зеркало по Куско	120/150/30	Полистирол 100%	-
3.	Шпатель Эйра	5/130/3	Полистирол 100%	-
4.	Комбинированный шпатель	5/130/3	Полистирол 100%	-

Таблица 2

№ п/п	Параметр	Значение
1.	Поверхностная плотность, г/м ²	Не менее 10
2.	Разрывная нагрузка, 1 кгс	Не менее 1
3.	Водоупорность, мм. вод. ст.	Не менее 800
4.	Сорбционная стойкость, г/г	Не менее 3
5.	Паропроницаемость, мг/см ² /час	Не менее 4

3. Противопоказания к применению

Комплект противопоказаний не имеет.

4. Применение комплекта.

Комплекты применяются в хирургических отделениях поликлиник, больниц, родильных домов.

В зависимости от вида проводимого вида вмешательства, как мера защиты.

Смена комплекта производится после каждого выполненного вмешательства.

Используется в течение времени проведения операции.

5. Порядок хранения.

Комплекты должны храниться в специально выделенных помещениях (бельевых).

Комплекты и тара должны быть промаркированы, хранение в отделениях немаркированных комплектов не допускается.

6. Порядок утилизации.

После окончания операций использованный комплект собирается в специальную емкость, где в случаях загрязнения биологическими жидкостями обеззараживается одним из регламентированных методов.

ООО "Лотос-Мед"

В настоящем документе прошито,
пронумеровано, скреплено печатью

3 листа(ов)

Генеральный директор

Ахметшин Р.Р.

