



**Общество с ограниченной ответственностью
«Лотос-Мед»**

420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лебедева, д.1, ИНН/КПП 1659123510/165901001,
ОГРН 1121690069291, в отделении БАНКА ТАТАРСТАН №8610, БИК 049205603,
К/С 30101810600000000063, Р/С 40702810262190004285, тел\факс 8(843) 204-35-92,
e-mail; ooo.lotos.med@gmail.com

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО "Лотос-Мед"

Ахметшин Р.Р.



Руководство по эксплуатации

Комплект защитной одежды врача - инфекциониста

1. Назначение изделия.

Комплект защитной одежды врача - инфекциониста, предназначен для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях.

2. Основные технические характеристики:

Наименование, размеры, применяемые материалы, при производстве комплекта приведены в таблице 1. Технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Длина/Ширина/Толщина (мм.)	Название материала и его содержание в %	Размеры
1.	Халат противоэпидемический с запахом	800/1400/0,02	Полипропилен 100%	50/52
2.	Куртка хирурга	700/1400/0,02	Полипропилен 100%	50/52
3.	Брюки хирурга	500/1400/0,02	Полипропилен 100%	50/52
4.	Комбинезон	800/1600/0,02	Полипропилен 100%	56
5.	Шапочка – шлем хирургическая противоэпидемическая	300/180/0,02	Полипропилен 100%	-
6.	Бахилы высокие хирургические	540/370/0,02	Полипропилен 100%	-
7.	Фартук хирургический	750/1200/0,04	Полипропилен 60% Полиэтилен 40%	-
8.	Маска хирургическая	175/95/1	Полипропилен 100%	-
9.	Нарукавники	400/200/0,04	Полипропилен 60% Полиэтилен 40%	-
10.	Полотенце (200-700)х(200-1000) мм	200/200/0,02- 700/1000/0,02	Вискоза 70% Полиэфир 30%	-
11.	Очки	180/30/45	Поликарбонат 100%	-
12.	Респиратор	175/95/1	Полипропилен 100%	-

Таблица 2

№ п/п	Параметр	Значение
1.	Поверхностная плотность, г/м ²	Не менее 10
2.	Разрывная нагрузка, 1 кгс	Не менее 1
3.	Водоупорность, мм. вод. ст.	Не менее 800
4.	Сорбционная стойкость, г/г	Не менее 3
5.	Паропроницаемость, мг/см ² /час	Не менее 4

3. Противопоказания к применению

Комплект противопоказаний не имеет.

4. Применение комплекта.

Комплекты применяются в инфекционных отделениях ЛПУ.

В зависимости от вида проводимого вида вмешательства, как мера защиты.

Смена комплекта производится после каждого выполненного вмешательства.

Используется в течение времени проведения операции.

5. Порядок хранения.

Комплекты должны храниться в специально выделенных помещениях (бельевых).

Комплекты и тара должны быть промаркированы, хранение в отделениях немаркированных комплектов не допускается.

6. Порядок утилизации.

После окончания операций использованный комплект собирается в специальную емкость, где в случаях загрязнения биологическими жидкостями обеззараживается одним из регламентированных методов.

ООО "Лотос-Мед"

В настоящем документе прошито,
пронумеровано, скреплено печатью

3 листа(ов)

Генеральный директор

Ахметшин Р.Р.

