



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРОНТ-М»

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ


ТК-01-«КРОНТ»

по ТУ 9452-033-11769436-2006

П А С П О Р Т
КРПФ.942819.8400 ПС
Ред.10.24



г. Химки
Московская область

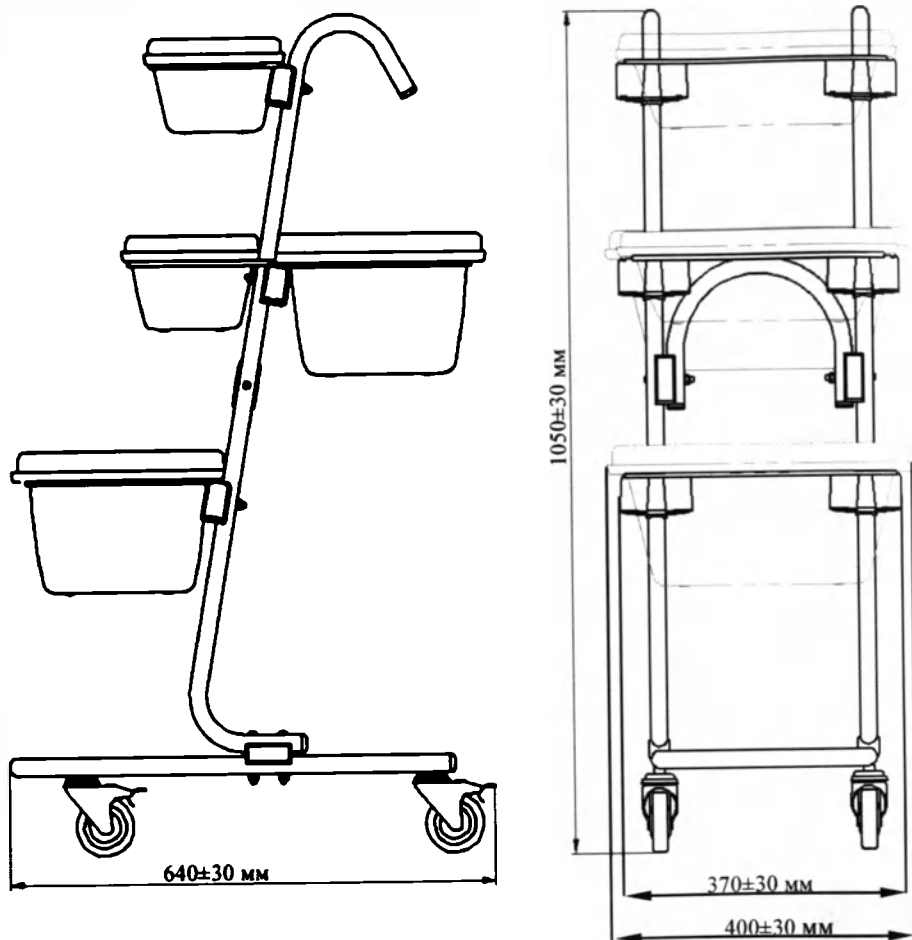

Внешний вид тележки для размещения контейнеров
ТК-01-«КРОНТ»

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ» по ТУ 9452-033-11769436-2006 (далее - «тележка»), предназначена для размещения «Контейнеров полимерных с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001, РУ №ФСР 2009/06144, (комплект: 2 контейнера КДС-3 и 2 контейнера КДС-5).

Тележка применяется для оснащения различных подразделений медицинских организаций, где применяются контейнеры для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий и хирургических инструментов КДС-«КРОНТ», непосредственно в местах использования - операционные, перевязочные, процедурные кабинеты.

Регистрационное удостоверение №ФСР 2011/11847 от 23.10.2024 г.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Габаритные размеры $(640 \times 370 \times 1050) \pm 30$ мм.
*- ширина с установленными контейнерами - 400 ± 30 мм
- 2.2. Масса - не более 6 кг.
- 2.3. Нагрузка - не более 30 кг.
- 2.4. Усилие перемещения - не более 100 Н.
- 2.5. Наружные поверхности тележки устойчивы к дезинфекции способом протирания в соответствии с МУ №287-113 МЗ РФ и инструкциями по применению конкретных дезинфицирующих средств, разрешенных в РФ для дезинфекции поверхностей.
- 2.6. Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
- 2.7. Срок службы 5 лет.
- 2.8. Маркировка.
- 2.8.1. Маркировочная табличка

	Описание
 АО «КРОНТ-М» Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ» по ТУ 9452-033-11769436-2006 РУ №ФСР 2011/11847 Россия Месяц/Год выпуска: ____/20__ Зав.№ ____	- товарный знак предприятия-изготовителя; - наименование тележки; - номер регистрационного удостоверения; - месяц/год выпуска; - заводской номер; - страна происхождения.

2.8.2. На внешней стороне упаковки нанесены манипуляционные знаки и символы:

						
«Хрупкое. Осторожно»	«Верх»	«Беречь от влаги»	«Крюками не брать»	Изготовитель*	Дата изготовления*	Штрих код* по заказу

* может быть нанесен на транспортировочную табличку.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Тележка выполнена из стальной трубы круглого сечения $\varnothing 22$ мм с порошковым покрытием или с порошковым антибактериальным покрытием - см. раздел «Свидетельство о приемке». Тележка оборудована поворотными колесными опорами $\varnothing 50$ (75) мм с резиновым ободом и тормозом, что позволяет надежно фиксировать тележку при эксплуатации.

3.2. Кронштейны контейнеров выполнены из прутка нержавеющей стали $\varnothing 6$ мм, устанавливаются на стойках тележки посредством держателей ТК.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Тележка поставляется в разборном виде (по заказу может поставляться в собранном виде).

№ п/п	Наименование	Кол-во
Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ» по ТУ 9452-033-11769436-2006 в составе:		
1	Стойка ТК	2
2	Поперечина ТК	1
3	Рама ТК нижняя	1
4	Комплект кронштейнов	1
5	Комплект крепежный №1	1
6	Комплект крепежный №2	1
7	Комплект крепежный №3	1
8	Комплект колес	1
9	Маркировочная табличка	1
10	Схема сборки	1
11	Упаковочный лист	1
12	Паспорт	1
13	«Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной	

очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ9451-009-11769436-2001 (ПУ № ФСР 2009/06144) в исполнениях, (при необходимости), комплект:
 - КДС-3 - 2 шт.;
 - КДС-5 - 2 шт.
 - паспорт - 1 шт.

1

5. СБОРКА ТЕЛЕЖКИ

Номера поставляемых крепежных комплектов соответствуют номерам сборочных узлов. Металлические трубы рамной конструкции и кронштейны имеют маркировочные номера.

Перечень элементов, входящих в крепежные комплекты, приведен в Таблице 1. Для сборки тележки необходим ключ гаечный S10 и отвертка слесарно-монтажная для винтов с крестообразным шлицем (не входят в комплект поставки).

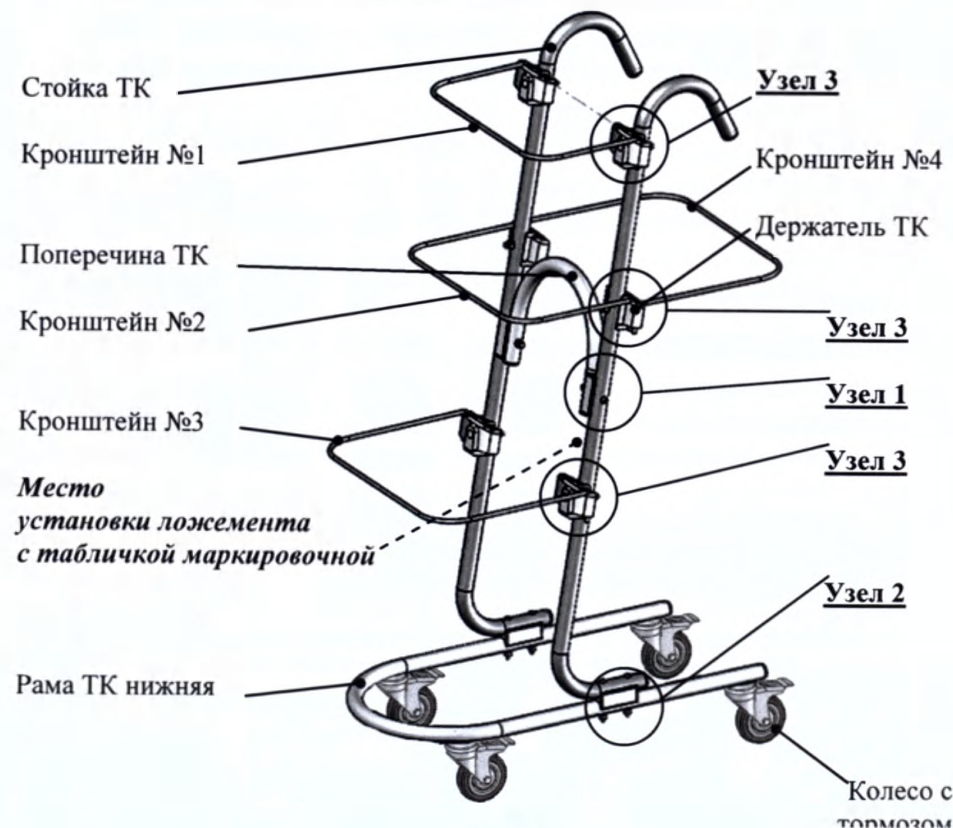


Рис.1




Примечание.


- Держатели ТК для кронштейна №2 и кронштейна №4 устанавливаются на тыльную сторону стоек.

- 5.1. Распаковать тележку и освободить составляющие части тележки от полиэтиленовой пленки.
- 5.2. На раму ТК нижнюю установить колеса, закрепить при помощи винтов 6x75 и гаек М6 через шайбы ø6 в соответствии с рис.2.
- 5.3. На один из ложементов из комплекта крепежного №1 наклеить маркировочную табличку, предварительно сняв защитный слой с клеящейся поверхности. Место установки ложемента с табличкой указано на рис.1.
- 5.4. Соединить стойки ТК №013 поперечиной ТК №203 с помощью 2-х винтов, гаек с шайбами, используя ложементы в качестве проставок (Таблица 1 Узел 1) в соответствии с рис.1.
- 5.5. Собранный конструкцию (п.5.4) установить на раму ТК нижнюю №402 и закрепить с помощью 4-х винтов, гаек с шайбами, используя ложементы в качестве проставок (Таблица 1 Узел 2) в соответствии с рис.4.
- 5.6. Установить Держатели ТК на стойки ТК №013 тележки (Таблица 1 Узел 3) в соответствии с рис.5.
- 5.7. Установить кронштейны контейнеров в держатели ТК в соответствии с рис.1:
 - В верхние держатели ТК установить кронштейн №1.
 - В средние держатели ТК установить кронштейн №2 и кронштейн №4 одновременно.
 - В нижние держатели ТК установить кронштейн №3.
- 5.8. Провести санитарную обработку тележки в соответствии с МУ №287-113.

Таблица 1

Рис.2- Установка Колес на раму ТК нижнюю 	Комплект колес: Колесо с тормозом – 4 шт. Винт 6x75 – 4 шт. Гайка М6 (колпачковая) – 4 шт. Шайба ø6 - 4 шт.
--	---

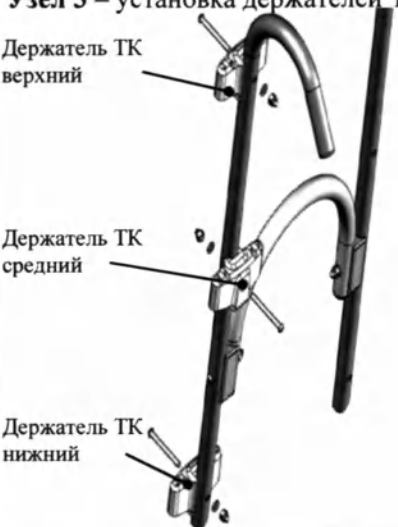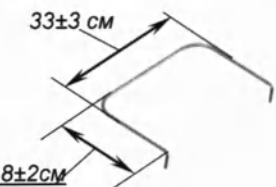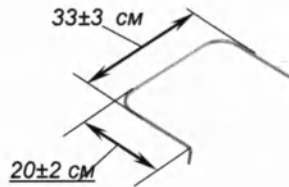Узел 1 – соединение стоек ТК поперечиной ТК 	Крепежные элементы из комплекта №1: Ложемент – 2 шт. Винт М6х55 – 2 шт. Гайка М6 (колпачковая) – 2 шт. Шайба ø6 - 2 шт.
Узел 2 – установка стоек ТК на раму ТК нижнюю 	Крепежные элементы из комплекта №2: Ложемент – 2 шт. Винт М6х55 – 4 шт. Гайка М6 (колпачковая) – 4 шт. Шайба ø6 - 4 шт.
Узел 3 – установка держателей ТК  Держатель ТК верхний Держатель ТК средний Держатель ТК нижний	Крепежные элементы из комплекта №3: Держатель ТК – 6 шт. Винт М6х45 – 6 шт. Гайка М6 (колпачковая) – 6 шт. Шайба ø6 - 6 шт. Примечание. Держатели ТК верхние и нижние устанавливаются на лицевую сторону стоек, держатели ТК средние - на тыльную.
Комплект кронштейнов №1  33±3 см 18±2 см	№2  33±3 см 20±2 см

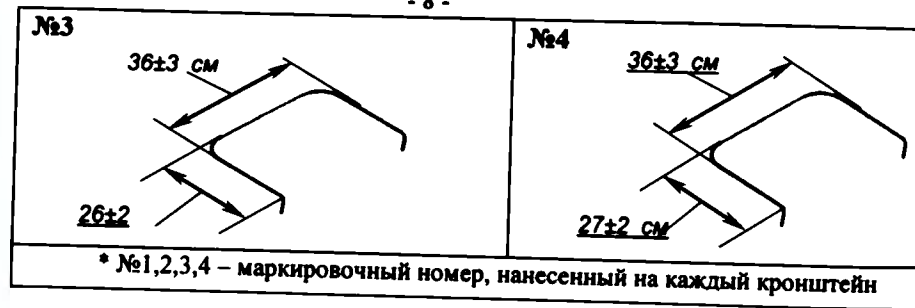

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не реже 1 раза в месяц проверять затяжку всех крепежных элементов тележки, при необходимости подтянуть.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация тележки и принадлежностей после истечения срока службы должна производиться в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами и санитарными правилами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», как отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к твердым коммунальным отходам).

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ», заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ 9452-033-11769436-2006 и признана годной к эксплуатации.

- ☐ Тележка
- ☐ Комплект контейнеров КДС-«КРОНТ» в исполнениях:
КДС-3 - 2 шт.;
КДС-5 - 2 шт.
паспорт – 1 шт.

Порошковое покрытие стальных труб тележки

- ☐ Эпоксидно-полиэфирная порошковая краска
- ☐ Антибактериальная эпоксидно-полиэфирная порошковая краска

Дата изготовления _____ Ответственное лицо _____
подпись, штамп ОТК

Штамп предприятия

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

9.1. Тележка в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться при следующих условиях:

- Температура окружающей среды -50 °C ÷ +40 °C;
- Относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25 °C. При более высокой температуре влажность должна быть ниже указанной.

9.2. Тележка должна транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с указанной на упаковке маркировкой. Допускается транспортирование всеми видами транспортных средств при температуре окружающего воздуха от -50 °C до +50 °C и относительной влажности 100% при температуре +25 °C.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тележки для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ» требованиям ТУ 9452-033-11769436-2006.

10.2. Гарантийный срок - 2 года с даты изготовления при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! *Предприятие-изготовитель оплачивает услуги транспортной компании по доставке и отправке оборудования при гарантийном ремонте от терминала в городе потребителя до терминала в городе Москве и обратно.*

Для ускорения процесса доставки предпочтительно пользоваться услугами транспортной компанией «Деловые линии» до терминала «Москва-Север»: ВНИМАНИЕ: Грузополучатель АО «КРОНТ-М», ИНН5047004056, телефон 8(985)861-30-56.

10.4. При отправке тележки на гарантийный ремонт необходимо приложить заполненный гарантийный талон и акт о возникновении неисправности, который должен содержать:

- дату возникновения неисправности;
- продолжительность работы до возникновения неисправности;
- краткое содержание неисправности;
- дату направления акта;
- принятые меры по устранению неисправности.

10.5. Срок устранения неисправности не более 30 дней с момента получения изделия предприятием-изготовителем.

10.6. Претензии не распространяются на недостатки (неисправности) изделия, вызванные следующими причинами: при наличии на изделии механических повреждений, применении изделия не по назначению и т.п.

Адрес изготовителя: АО «КРОНТ-М: 141402, МО, г. Химки, ул. Спартаковская, д.9, пом.1. Тел/факс: +7(495)500-48-84 (многоканальный). E-mail: info@kront.com, Internet: www.kront.com.

Сервисный центр: телефон +7(985)861-30-56, E-mail: service@kront.com

☎ ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ +7(495) 500-48-84

Внимание! В послегарантийный период предприятие-изготовитель осуществляет на договорной основе ремонт тележки.

Перечень применяемых национальных стандартов

Обозначение	Наименование документа
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 9.032-74	ЕСЗКЗ. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
ГОСТ 9.303-84	ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условий эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические условия
ГОСТ 31508-2012	Классификация в зависимости от потенциального риска применения
ГОСТ Р 50444-2020	Прибора, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия
ГОСТ Р 51084-2021	Тележки для транспортирования пациентов и грузов. Общие технические условия.
ГОСТ 5632-2014	Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки
ГОСТ 10704-91	Трубы стальные электросварные прямошовные
ГОСТ 1050-2013	Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сплавов
ГОСТ 380-2005	Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки
МУ 287-113	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения.
ГОСТ 9142-2014	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
СанПиН 2.1.3684-21	«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

АО «КРОНТ-М»

Россия, 141402, МО, г. Химки, ул. Спартаковская, 9 пом.1,
тел. +7(495) 500-48-84 (многоканальный)

E-mail: info@kront.com, Internet: www.kront.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт Тележки для размещения контейнеров
ТК-01-«КРОНТ» по ТУ 9452-033-11769436-2006
зав. № _____

Дата изготовления « ____ » _____ 20__

Штамп предприятия _____

подпись, расшифровка подписи _____

Владелец и его адрес _____

Название организации (полностью) _____

индекс, город, область/район, улица, дом, строение, телефон _____

Характер неисправности _____

заполняется лицом, ответственным за техническое обслуживание _____

Контактное лицо, ответственное за техническое обслуживание: _____

ФИО, телефон, e-mail _____

Дата возникновения неисправности _____

Подпись _____

Выполнена работа по устранению неисправностей: _____

дата _____

подпись _____

Штамп предприятия _____

Генеральный директор
В.П.Сизиков

