



Директор  
ООО «СТЕРРА»  
/ Исмагилов Р.Д. /

2015 г.

## Инструкция по применению

**КОМПЛЕКТ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И  
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ХИРУРГИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ И  
МАЛОИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР СТЕРИЛЬНЫЙ  
ОДНОРАЗОВЫЙ «СТЕРРА» ПО ТУ 9398–001–46131279–2015**

производства ООО «СТЕРРА»

2015 г.

## Содержание:

|                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. Назначение</b>                                                                                                                                                                                                                         | 6  |
| <b>2. Область применения</b>                                                                                                                                                                                                                 | 6  |
| <b>3. Показания для применения</b>                                                                                                                                                                                                           | 6  |
| <b>4. Противопоказания для применения</b>                                                                                                                                                                                                    | 6  |
| <b>5. Меры предосторожности при применении</b>                                                                                                                                                                                               | 6  |
| <b>6. Возможные побочные действия при использовании</b>                                                                                                                                                                                      | 6  |
| <b>7. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями</b>                                                                                                                                                                                    | 7  |
| <b>8. Указание возможности и особенностей применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания</b> | 7  |
| <b>9. Сведения о возможном влиянии использования на способность управлять транспортными средствами, механизмами</b>                                                                                                                          | 7  |
| <b>10. Состав комплекта</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |
| <b>10.1 Покрытие для инструментального стола:</b>                                                                                                                                                                                            |    |
| - Введение                                                                                                                                                                                                                                   | 8  |
| - Назначение                                                                                                                                                                                                                                 | 8  |
| - Основные технические характеристики                                                                                                                                                                                                        | 8  |
| - Способ применения                                                                                                                                                                                                                          | 8  |
| <b>10.2. Простыня хирургическая малая:</b>                                                                                                                                                                                                   |    |
| - Введение                                                                                                                                                                                                                                   | 9  |
| - Назначение                                                                                                                                                                                                                                 | 9  |
| - Основные технические характеристики                                                                                                                                                                                                        | 9  |
| - Способ применения                                                                                                                                                                                                                          | 10 |
| <b>10.3.Простыня хирургическая малая с адгезивным слоем по краю:</b>                                                                                                                                                                         |    |
| - Введение                                                                                                                                                                                                                                   | 11 |
| - Назначение                                                                                                                                                                                                                                 | 11 |
| - Основные технические характеристики                                                                                                                                                                                                        | 11 |
| - Способ применения                                                                                                                                                                                                                          | 12 |
| <b>10.4. Простыня хирургическая большая:</b>                                                                                                                                                                                                 |    |
| - Введение                                                                                                                                                                                                                                   | 13 |
| - Назначение                                                                                                                                                                                                                                 | 13 |
| - Основные технические характеристики                                                                                                                                                                                                        | 13 |
| - Способ применения                                                                                                                                                                                                                          | 14 |
| <b>10.5. Полотенце для рук:</b>                                                                                                                                                                                                              |    |
| - Введение                                                                                                                                                                                                                                   | 15 |
| - Назначение                                                                                                                                                                                                                                 | 15 |
| - Основные технические характеристики                                                                                                                                                                                                        | 15 |
| - Способ применения                                                                                                                                                                                                                          | 16 |
| <b>10.6. Салфетка хирургическая:</b>                                                                                                                                                                                                         |    |
| - Введение                                                                                                                                                                                                                                   | 17 |
| - Назначение                                                                                                                                                                                                                                 | 17 |
| - Основные технические характеристики                                                                                                                                                                                                        | 17 |
| - Способ применения                                                                                                                                                                                                                          | 18 |
| <b>10.7. Салфетка для пациента бумажно-полиэтиленовая:</b>                                                                                                                                                                                   |    |
| - Введение                                                                                                                                                                                                                                   | 19 |
| - Назначение                                                                                                                                                                                                                                 | 19 |
| - Основные технические характеристики                                                                                                                                                                                                        | 19 |
| - Способ применения                                                                                                                                                                                                                          | 19 |

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| <b>10.8. Салфетка впитывающая:</b>                      |    |
| - Введение                                              | 20 |
| - Назначение                                            | 20 |
| - Основные технические характеристики                   | 20 |
| - Способ применения                                     | 20 |
| <b>10.9. Бандаж гемостатический для гемодиализа:</b>    |    |
| - Введение                                              | 21 |
| - Назначение                                            | 21 |
| - Основные технические характеристики                   | 21 |
| - Способ применения                                     | 21 |
| <b>10.10. Тупфер:</b>                                   |    |
| - Введение                                              | 22 |
| - Назначение                                            | 22 |
| - Основные технические характеристики                   | 22 |
| - Способ применения                                     | 22 |
| <b>10.11. Тампон круглый:</b>                           |    |
| - Введение                                              | 23 |
| - Назначение                                            | 23 |
| - Основные технические характеристики                   | 23 |
| - Способ применения                                     | 23 |
| <b>10.12. Тампон треугольный:</b>                       |    |
| - Введение                                              | 24 |
| - Назначение                                            | 24 |
| - Основные технические характеристики                   | 24 |
| - Способ применения                                     | 24 |
| <b>10.13. Фиксирующий бинт эластичный:</b>              |    |
| - Введение                                              | 25 |
| - Назначение                                            | 25 |
| - Основные технические характеристики                   | 25 |
| - Способ применения                                     | 25 |
| <b>10.14. Фиксирующая лента:</b>                        |    |
| - Введение                                              | 26 |
| - Назначение                                            | 26 |
| - Основные технические характеристики                   | 26 |
| - Способ применения                                     | 26 |
| <b>10.15. Послеоперационная повязка:</b>                |    |
| - Введение                                              | 27 |
| - Назначение                                            | 27 |
| - Основные технические характеристики                   | 27 |
| - Способ применения                                     | 27 |
| <b>10.16. Перчатки медицинские:</b>                     |    |
| - Введение                                              | 28 |
| - Назначение                                            | 28 |
| - Основные технические характеристики                   | 28 |
| - Способ применения                                     | 28 |
| <b>10.17. Маска медицинская из нетканых материалов:</b> |    |
| - Введение                                              | 29 |
| - Назначение                                            | 29 |
| - Основные технические характеристики                   | 29 |
| - Способ применения                                     | 29 |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| <b>10.18. Шприц одноразовый:</b>                             |    |
| - Введение                                                   | 30 |
| - Назначение                                                 | 30 |
| - Основные технические характеристики                        | 30 |
| - Способ применения                                          | 30 |
| <b>10.19. Шприц Жане:</b>                                    |    |
| - Введение                                                   | 31 |
| - Назначение                                                 | 31 |
| - Основные технические характеристики                        | 31 |
| - Способ применения                                          | 31 |
| <b>10.20. Загубник полимерный:</b>                           |    |
| - Введение                                                   | 32 |
| - Назначение                                                 | 32 |
| - Основные технические характеристики                        | 32 |
| - Способ применения                                          | 32 |
| <b>10.21. Нож для снятия швов:</b>                           |    |
| - Введение                                                   | 33 |
| - Назначение                                                 | 33 |
| - Основные технические характеристики                        | 33 |
| - Способ применения                                          | 34 |
| <b>10.22. Зажим полимерный:</b>                              |    |
| - Введение                                                   | 35 |
| - Назначение                                                 | 35 |
| - Основные технические характеристики                        | 35 |
| - Способ применения                                          | 35 |
| <b>10.23. Пинцет полимерный:</b>                             |    |
| - Введение                                                   | 36 |
| - Назначение                                                 | 36 |
| - Основные технические характеристики                        | 36 |
| - Способ применения                                          | 36 |
| <b>10.24. Лоток-емкость:</b>                                 |    |
| - Введение                                                   | 37 |
| - Назначение                                                 | 37 |
| <b>10.25. Контейнер с градуировкой:</b>                      |    |
| - Введение                                                   | 38 |
| - Назначение                                                 | 38 |
| - Основные технические характеристики                        | 38 |
| - Способ применения                                          | 38 |
| <b>10.26. Воздуховод полимерный:</b>                         |    |
| - Введение                                                   | 39 |
| - Назначение                                                 | 39 |
| - Основные технические характеристики                        | 39 |
| - Способ применения                                          | 39 |
| <b>11. Требования безопасности и охраны окружающей среды</b> | 40 |
| <b>12. Комплект поставки</b>                                 | 40 |
| <b>13. Сведения об эксплуатации</b>                          | 41 |
| <b>14. Требования к техническому обслуживанию и ремонту</b>  | 41 |
| <b>15. Условия эксплуатации</b>                              | 41 |
| <b>16. Маркировка</b>                                        | 41 |
| <b>17. Упаковка</b>                                          | 42 |
| <b>18. Транспортировка</b>                                   | 42 |
| <b>19. Хранение</b>                                          | 42 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>20. Гарантии изготовителя</b>  | 42 |
| <b>21. Сведения об утилизации</b> | 43 |
| <b>22. Гарантийный талон</b>      | 43 |

## **1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый «СТЕРРА» предназначен для снятия швов и проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур (инъекциях, инфузиях, гемотрансфузиях, гемодиализе (подключении и отключении) катетеризации вен и артерий, плазмаферезе (подключении и отключении), анестезии, оказании экстренной помощи, обработки ран, ФГДС, УЗИ, ЭКГ, бронхоскопии, цистоскопии, колоноскопии, введении подкожных имплантатов, эндоскопии, циркумцизио, грыжесечении, эксцизии, лапороскопии, торакоскопии, риноскопии, артроскопии, криохирургии, лазерной хирургии, микрохирургии) (далее по тексту – медицинский комплект).

## **2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый «СТЕРРА» предназначен для проведения различных медицинских манипуляций, лечебных процедур и осмотров в условиях стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждений, в процедурных и перевязочных кабинетах, в операционных и хирургических отделениях и других специализированных отделениях клиник и больниц.

Способ применения: вскрыть упаковку, выбрать необходимые для работы изделия согласно внутренних стандартов ЛПУ.

## **3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ**

Использование готовых комплектов в лечебной практике или при хирургических манипуляциях облегчает соблюдение правил асептики, препятствует возникновению заражения, обеспечивает безопасность инфицирования пациента и медицинского персонала.

## **4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ**

Комплект является изделием однократного применения. Не применять при нарушении целостности упаковки. Инструкция по применению находится внутри упаковки. Изготовлено из сертифицированных материалов. Раздражающее и аллергическое воздействие на кожу пациента отсутствует.

## **5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ**

Не применять при нарушении целостности упаковки. Не использовать после истечения срока годности. Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

## **6. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

Побочные реакции, которые могут потребовать дополнительного вмешательства, не выявлены.

## **7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ**

Комплект может взаимодействовать во время проведения процедур и манипуляций с другими стерильными (условно стерильными) медицинскими изделиями в асептических условиях.

Комплект, который содержит все необходимые элементы, позволяет провести процедуру оперативно, в отличие от использования компонентов из различных упаковок. Обеспечивает удобство в использовании.

## **8. УКАЗАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ, ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ**

Использовать готовые медицинские комплекты разрешено лишь специально обученному медицинскому персоналу в условиях стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждений, в процедурных и перевязочных кабинетах и в специализированных отделениях клиник и больниц. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

8.1 Применение комплектов для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями не проводилось. Для проведения стандартных медицинских манипуляций и малоинвазивных процедур для человека, имеющего имплантат, применение Комплекта рекомендуется.

8.2 Применение комплектов при беременности и кормлении грудью  
Специальных исследований применения комплектов при беременности и кормлении грудью не проводилось. Для проведения стандартных медицинских манипуляций и малоинвазивных процедур для беременных женщин или в период грудного вскармливания применение Комплекта рекомендуется.

Применение комплектов у детей.

Специальных исследований применения Комплекта в педиатрической практике не проводилось. Применение комплектов для стандартных медицинских манипуляций и малоинвазивных процедур в организациях оказания медицинской помощи детям или педиатрическими службами рекомендуется. Использование Комплектов детьми строго запрещено.

Применение комплектов при имеющихся хронических заболеваниях

Специальных исследований применения комплектов при наличии хронических заболеваний не проводилось. Для проведения стандартных медицинских манипуляций и малоинвазивных процедур для людей с хроническими заболеваниями применение Комплекта рекомендуется.

## **9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ**

Готовые медицинские одноразовые комплекты не относятся к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека и не влияют на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами, так как Комплект не предназначен для использования во время работ с техническими механическими, транспортными средствами.

## **10. СОСТАВ КОМПЛЕКТА**

### **10.1. ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СТОЛА**

#### **ВВЕДЕНИЕ**

Покрытие для инструментального стола (далее – покрытие) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

#### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Покрытие для инструментального стола предназначено для защиты инструментов от попадания микробов, пыли, грязи, влаги и других вредных влияний внешней среды при выполнении медицинских процедур и иных медицинских вмешательств.

Покрытие применяется в отделениях ЛПУ (в т.ч. операционных и хирургических) в смотровых врачебных кабинетах, клиниках, массажных салонах, спа-салонах, и в любых учреждениях, где необходимо поддерживать высокий уровень асептики.

#### **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Покрытие изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- высокие параметры фильтрации
- улучшенные барьерные свойства
- высокие влагоотталкивающие качества
- воздухопроницаемость
- низкая статичность
- улучшенные тактильные качества

Покрытие изготавливается различных размеров с длиной от  $90\pm 5$  см до  $160\pm 5$  см и шириной от  $40\pm 5$  см до  $120\pm 5$  см и массой, не более 90 г.

Полотно покрытия не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Торцы покрытия должны иметь ровный срез, без технологических дефектов и механических повреждений.

Поверхность покрытия должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация покрытия в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно покрытия не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

#### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Вскрыть упаковку, Не нарушая порядок укладки, достать изделие, накрыть рабочую поверхность инструментального стола, согласно алгоритму действий при накрытии инструментального стола.

## 10.2. ПРОСТЫНЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ МАЛАЯ

### ВВЕДЕНИЕ

Простыня хирургическая малая (далее – простыня), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

### НАЗНАЧЕНИЕ

Простыня хирургическая малая предназначена для надежной индивидуальной защиты от проникновения микробов, пыли, грязи, влаги и других вредных влияний внешней среды при выполнении медицинских процедур и иных медицинских вмешательств.

Простыня применяется в отделениях ЛПУ(в т.ч. операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологии, в клиниках, массажных салонах, спалонах, и в любых учреждениях, где необходимо поддерживать высокий уровень асептики. Простыня хирургическая малая стелется на операционный и инструментальный стол, кровать пациента, кушетку, используются на гинекологическом кресле, пеленальном столе, а также при диагностических процедурах.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простыня изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- повышенные прочностные характеристики
- высокие параметры фильтрации
- улучшенные барьерные свойства
- высокие водоотталкивающие качества
- хорошая впитываемость
- воздухопроницаемость
- способствует равномерному теплообмену
- низкая статичность
- невысокие коэффициенты упругости
- отсутствие «ворсистости» и осыпание материала
- улучшенные тактильные качества

Простыня изготавливается различных размеров с длиной от  $70 \pm 10$  см до  $190 \pm 10$  см и шириной от  $50 \pm 10$  см до  $150 \pm 10$  см и массой, не более 110 г.

Полотно простыни не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Торцы простыни должны иметь ровный срез, без технологических дефектов и механических повреждений.

Поверхность простыни должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений, неравномерности окраски.

Стерилизация простыни в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно простыни не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Вскрыть упаковку, не нарушая порядок укладки, достать изделие, накрыть рабочую поверхность или манипуляционную область, согласно алгоритму действий при подготовке к медицинскому вмешательству.

### **10.3. ПРОСТЫНЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ МАЛАЯ САДГЕЗИВНЫМ СЛОЕМ ПО КРАЮ**

#### **ВВЕДЕНИЕ**

Простыня хирургическая малая с адгезивным слоем по краю (далее – простыня), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

#### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Простыня применяется в отделениях ЛПУ(в т.ч операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологии, в клиниках, массажных салонах, сра-салонах, и в любых учреждениях, где необходимо поддерживать высокий уровень асептики. Простыня фиксируется на неповрежденный кожный покров человека, предметы, операционный и инструментальный стол, кровать пациента, кушетку, используется на гинекологическом кресле, пеленальном столе, а также при диагностических процедурах. Вырез предназначен для огибания инструментов, конструкций операционного стола или иных приспособлений, необходимых для проведения медицинского вмешательства. и в качестве подкладной пленки для ухода за пациентом.

#### **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Простыня изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- повышенные прочностные характеристики
- высокие параметры фильтрации
- улучшенные барьерные свойства
- высокие водоотталкивающие качества
- хорошая впитываемость
- воздухопроницаемость
- способствует равномерному теплообмену
- низкая статичность
- невысокие коэффициент упругости
- отсутствие «ворсистости» и осыпание материала
- улучшенные тактильные качества

Простыня изготавливается различных размеров с длиной от  $70 \pm 10$  см до  $390 \pm 10$  см и шириной от  $50 \pm 10$  см до  $240 \pm 10$  см и массой, не более 230 г.

Сопротивление отслаиванию от металлической пластины должно быть не менее 0,35 Н/см.

Полотно простыни не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Торцы простыни должны иметь ровный срез, без технологических дефектов и механических повреждений.

Поверхность простыни должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация простыни в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно простыни не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Вскрыть упаковку, не нарушая порядок укладки, достать изделие, накрыть рабочую поверхность или манипуляционную область, снять защитный элемент с клеящего края простыни, зафиксировать простынь согласно алгоритму действий при подготовке к медицинскому вмешательству.

## 10.4. ПРОСТЫНЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ БОЛЬШАЯ

### ВВЕДЕНИЕ

Простыня хирургическая большая (далее – простыня), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### НАЗНАЧЕНИЕ

Простыня хирургическая большая предназначена для надежной индивидуальной защиты от проникновения микробов, пыли, грязи, влаги и других вредных влияний внешней среды при выполнении медицинских процедур и иных медицинских вмешательств. Простыня применяется в отделениях ЛПУ (в т.ч. операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологии, в клиниках, массажных салонах, спасалонах, и в любых учреждениях, где необходимо поддерживать высокий уровень асептики. Простыня хирургическая большая стелется на операционный стол, кровать пациента, кушетку, используются в качестве покрытия на габаритные предметы. Благодаря хорошей драпируемости позволяет огибать неравномерные подъемы и изгибы сложных конструкций. Также большой хирургической простыней укрывают пациента или ограничивают операционное поле несколькими простынями.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простыня изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- повышенные прочностные характеристики
- высокие параметры фильтрации
- улучшенные барьерные свойства
- высокие водоотталкивающие качества
- хорошая впитываемость
- воздухопроницаемость
- способствует равномерному теплообмену
- низкая статичность
- невысокие коэффициенты упругости
- отсутствие «ворсистости» и осыпание материала
- улучшенные тактильные качества

Простыня изготавливается различных размеров с длиной от  $170 \pm 10$  см до  $390 \pm 10$  см и шириной от  $90 \pm 10$  см до  $240 \pm 10$  см и массой, не более 230 г.

Полотно простыни не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Поверхность простыни должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация простыни в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно простыни не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Вскрыть упаковку, Не нарушая порядок укладки, достать изделие, накрыть рабочую поверхность или манипуляционную область, согласно алгоритму действий при подготовке к медицинскому вмешательству.

## **10.5. ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ РУК**

### **ВВЕДЕНИЕ**

Полотенце для рук (далее – полотенце) входит в комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Полотенце предназначено для удаления влаги с поверхности кожи после гигиенических процедур при подготовке к выполнению медицинских вмешательств. Возможно использование полотенца для личной гигиены как персонала, так и пациента.

Полотенце применяется в отделениях ЛПУ (в т.ч. операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологии, в клиниках, массажных салонах, сра-салонах, и в любых учреждениях, где необходимо поддерживать высокий уровень гигиены.

### **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Полотенце изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- повышенные прочностные характеристики
- улучшенные барьерные свойства
- хорошая впитываемость
- воздухопроницаемость
- способствует равномерному теплообмену
- низкая статичность
- невысокий коэффициент упругости
- отсутствие «ворсистости» и осыпание материала
- улучшенные тактильные качества

Полотенце изготавливается различных размеров с длиной от  $40 \pm 5$  см до  $90 \pm 5$  см и шириной от  $40 \pm 5$  см до  $90 \pm 5$  см.

Поглотительная способность должна быть не менее 5 г/г.

Полотно полотенца не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Поверхность полотенца должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация полотенца в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно полотенца не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку, Не нарушая порядок укладки, достать изделие, положить на стерильную поверхность вскрытой упаковки. После гигиенической обработки рук, промокающими движениями удалить влагу с поверхности кожи. При необходимости, для умывание лица и шеи, требуется использование отдельного полотенца.

## 10.6. САЛФЕТКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ

### ВВЕДЕНИЕ

Салфетка хирургическая (далее – салфетка), входит в комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### НАЗНАЧЕНИЕ

Салфетка хирургическая предназначена для надежной индивидуальной защиты от проникновения микробов, пыли, грязи, влаги и других вредных влияний внешней среды при выполнении медицинских процедур и иных медицинских вмешательств.

Салфетка применяется в отделениях ЛПУ, в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологии, в клиниках, массажных салонах, spa-салонах, и в любых учреждениях, где необходимо поддерживать высокий уровень гигиены.

Салфетка служит для обеспечения стерильности при проведении медицинских вмешательств любой сложности, для ограничения операционного поля, для укрытия кожных покровов, для подкладывания под манипуляционную зону.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Салфетка изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- повышенные прочностные характеристики
- высокие параметры фильтрации
- улучшенные барьерные свойства
- высокие водоотталкивающие качества
- хорошая влаговпитываемость
- воздухопроницаемость
- способствует равномерному теплообмену
- низкая статичность
- невысокие коэффициент упругости
- отсутствие «ворсистости» и осыпание материала
- улучшенные тактильные качества

Салфетка изготавливается различных размеров с длиной от  $30 \pm 10$  см до  $90 \pm 10$  см и шириной от  $30 \pm 10$  см до  $90 \pm 10$  см и массой, не более 56 г.

Полотно салфетки не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Поверхность салфетки должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация салфетки в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно салфетки не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку, не нарушая порядок укладки, достать изделие, подложить под или накрыть рабочую поверхность или манипуляционную область, согласно алгоритму действий при подготовке к медицинскому вмешательству.

## 10.7. САЛФЕТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА БУМАЖНО-ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

### ВВЕДЕНИЕ

Салфетка для пациента бумажно-полиэтиленовая (далее – салфетка), входит в комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### НАЗНАЧЕНИЕ

Салфетка предназначена для индивидуальной защиты при выполнении медицинских процедур и иных медицинских вмешательств. Обладает высокой впитывающей способностью и обеспечивает отличный барьер против влаги благодаря рельефному горизонтальному рисунку.

Салфетка применяется в отделениях ЛПУ (в т.ч. операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологии, в клиниках, массажных салонах, сра-салонах, и в любых учреждениях, где необходимо поддерживать высокий уровень асептики.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Салфетка изготавливается различных размеров с длиной от  $40 \pm 1,0$  см до  $45 \pm 1,0$  см и шириной от  $30 \pm 1,0$  см до  $35 \pm 1,0$  см и массой, не более 5 г.

Салфетка изготавливается стерильной.

Полотно салфетки не должны содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Поверхность салфетки должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация салфетки в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно салфетки не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

Для изготовления салфетки используется бумага ламинированная марки ОДП.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку, не нарушая порядок укладки, достать изделие, применить, согласно алгоритму действий медицинской манипуляции.

## 10.8. САЛФЕТКА ВПИТЫВАЮЩАЯ

### ВВЕДЕНИЕ

Салфетка впитывающая (далее – салфетка), входит в комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### НАЗНАЧЕНИЕ

Салфетка впитывающая предназначена для впитывания, удержания влаги внутри и уменьшения болевых ощущений при перевязке.

Салфетка впитывающая применяется в отделениях ЛПУ (в т.ч. операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, клиниках, массажных салонах, спартиналах, и в любых учреждениях, где необходимо поддерживать высокий уровень асептики. Предназначены для ухода за свежими и хроническими ранами с обильными выделениями, а также в качестве изоляции ран и других повреждений кожных покровов от воздействия окружающей среды, соблюдая асептические условия.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Салфетка изготавливается из высококачественного нетканого материала, который имеет свойства:

- высокая гигроскопичность
- воздухопроницаемость
- низкая статичность
- улучшенные тактильные качества

Салфетка изготавливается различных размеров с длиной от  $3\pm 0,5$  см до  $40\pm 5$  см и шириной от  $3\pm 0,5$  см до  $40\pm 5$  см и массой, не более 20 г.

Поглотительная способность должна быть не менее 5 г/г.

Полотно салфетки не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Поверхность салфетки должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация салфетки в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно салфетки не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий во время проведения процедуры.

## 10.9. БАНДАЖ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА

### ВВЕДЕНИЕ

Бандаж гемостатический для гемодиализа (далее – бандаж) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж гемостатический для гемодиализа предназначен для прекращения кровотечения со стороны прокола после удаления иглы.

Бандаж широко применяется в хирургической практике.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бандаж изготавливается размером  $7,2 \times 3,0 \pm 0,5$  см массой, не более 1 г.

Бандаж изготавливается стерильным.

Полотно бандажа не должно содержать аспирета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Поверхность бандажа должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Сопротивление отслаиванию от металлической пластины должно быть не менее 0,35 Н/см.

Поглотительная способность должна быть не менее 5 г/г.

Стерилизация бандажа в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Материал бандажа не должен выделять резкого или гнилостного запаха.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Вскрыть упаковку. Достать бандаж.
2. Отделите часть защитной бумаги от бандажа перед удалением иглы и удалите иглу, прижав губку к месту пункции.
3. После удаления иглы, прижмите бандаж к месту пункции и осторожно приклейте липкую часть к коже.
4. В случае использования бандажа при гемодиализе, прижмите место пункции через бандаж пальцем или повязкой на некоторое время после удаления иглы.

## 10.10. ТУПФЕР

### ВВЕДЕНИЕ

Тупфер входит в комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### НАЗНАЧЕНИЕ

Тупфер предназначен для обработки манипуляционного поля, для удаления влаги или биологического отделения раневых поверхностей, для осушения тканей или небольших полостей при проведении хирургических процедур.

Тупфер применяется в отделениях ЛПУ (в т.ч. операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологии, в клиниках, массажных салонах, спа-салонах, и в любых учреждениях, где необходимо поддерживать высокий уровень асептики.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тупфер изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- хорошая впитываемость
- воздухопроницаемость
- низкая статичность
- невысокий коэффициент упругости
- отсутствие «ворсистости» и осыпание материала
- улучшенные тактильные качества

Тупфер изготавливается различных размеров с длиной  $1,5 \pm 0,5$  см, шириной от  $10 \pm 0,5$  см до  $18 \pm 0,5$  см. Длина аппликатора может быть 100 или  $150 \pm 5$  мм и массой, не более 2 г.

Материал тупфера не должен содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Держатель не должен иметь насечек, изломов, отслаивающих волокон древесины.

Впитывающая часть не должна иметь провисания или проваливания впитывающего слоя.

Материал тупфера должен быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация тупфера в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Материал тупфера не должен выделять резкого или гнилостного запаха.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий медицинского вмешательства.

## 10.11. ТАМПОН КРУГЛЫЙ

### ВВЕДЕНИЕ

Тампон круглый (далее – тампон), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### НАЗНАЧЕНИЕ

Тампон предназначен для остановки кровотечения, общей обработки ран и дезинфекции больших областей кожи, для удаления влаги или биологического отделения раневых поверхностей, для осушения тканей или полостей при проведении хирургических процедур.

Тампон применяется в отделениях ЛПУ (в т.ч. операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологии, в клиниках, массажных салонах, сра-салонах, и в любых учреждениях, где необходимо поддерживать высокий уровень асептики.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тампон изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- хорошая впитываемость
- воздухопроницаемость
- низкая статичность
- невысокие коэффициент упругости
- отсутствие «ворсистости» и осыпание материала
- улучшенные тактильные качеств.

Тампон изготавливается различных размеров, диаметром от  $1,5 \pm 0,5$  см до  $7 \pm 0,5$  см и массой, не более 5г.

Впитывающая способность при полном погружении должна быть не менее 5,0 г/г.

Полотно тампона не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Поверхность тампона должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация тампона в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно тампона не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий медицинского вмешательства.

## 10.12. ТАМПОН ТРЕУГОЛЬНЫЙ

### ВВЕДЕНИЕ

Тампон треугольный (далее – тампон), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### НАЗНАЧЕНИЕ

Тампон предназначен для остановки кровотечения, общей обработки ран и дезинфекции больших областей кожи, для удаления влаги или биологического отделения раневых поверхностей, для осушения тканей или полостей при проведении хирургических процедур.

Тампон применяется в отделениях ЛПУ (в т.ч. операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологии, в клиниках, массажных салонах, сп-салонах, и в любых учреждениях, где необходимо поддерживать высокий уровень асептики.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тампон изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- хорошая впитываемость
- воздухопроницаемость
- низкая статичность
- невысокие коэффициент упругости
- отсутствие «ворсистости» и осыпание материала
- улучшенные тактильные качества.

Тампон изготавливается размером  $5,0 \pm 1,5 \times 5,0 \pm 1,5 \times 5,0 \pm 1,5$  см и массой, не более 5 г.

Впитывающая способность при полном погружении должна быть не менее 5,0 г/г.

Полотно тампона не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Поверхность тампона должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация тампона в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно тампона не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий медицинского вмешательства.

## **10.13. ФИКСИРУЮЩИЙ БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ**

### **ВВЕДЕНИЕ**

Фиксирующий бинт эластичный (далее – бинт), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Фиксирующий бинт эластичный предназначен для фиксации повязок всех видов, в особенности на суставах, а также частях тела, имеющих коническую или округлую форму.

### **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бинт изготавливается различных размеров длиной  $4 \pm 0,5$  м, шириной от  $2,5 \pm 0,5$  см до  $12 \pm 0,5$  см и массой, не более 15 г.

Полотно бинта не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Бинт не должен иметь складок и сборок.

Поверхность бинта должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация бинта в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно бинта не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий медицинского вмешательства.

## 10.14. ФИКСИРУЮЩАЯ ЛЕНТА

### ВВЕДЕНИЕ

Фиксирующая лента (далее – лента), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### НАЗНАЧЕНИЕ

Фиксирующая лента предназначена для перевязок и оказания первой помощи при мелких ссадинах и порезах, для фиксации хирургических пеленок, салфеток на ограниченном участке вокруг манипуляционного поля, для закрепления перевязочных материалов на раневой поверхности, для фиксации катетеров, зондов, дренажей, трубок, и др. предметы медицинского назначения.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лента изготавливается различных размеров длиной от  $10 \pm 1,0$  см до  $18 \pm 1,0$  см, шириной от  $1,5 \pm 0,5$  см до  $4,5 \pm 0,5$  см и массой, не более 2 г.

Сопротивление отслаиванию от металлической пластины должно быть не менее 0,35 Н/см.

Полотно ленты не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Лента не должна иметь складок и сборок.

Поверхность ленты должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация ленты в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно ленты не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

Для изготовления ленты используются высококачественные нетканые материалы.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Накожно. Не касаясь раневых или поврежденных поверхностей, заранее отделив защитное покрытие, частью фиксирующей ленты закрепить необходимый предмет или ткань, свободной частью прижать к здоровой поверхности кожи.

## 10.15. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА

### ВВЕДЕНИЕ

Послеоперационная повязка (далее – повязка) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### НАЗНАЧЕНИЕ

Послеоперационная повязка предназначена для впитывания, удержания влаги внутри и уменьшения болевых ощущений при перевязке. Подушечка снабжена устраняющим запах, не прилипающим к ране впитывающим слоем, поэтому повязка безболезненно удаляется.

Послеоперационная повязка применяется в отделениях ЛПУ (в т.ч. операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, клиниках, массажных салонах, спа-салонах, и в любых учреждениях, где необходимо поддерживать высокий уровень асептики. Предназначена для стерильного ухода за послеоперационными ранами и прочими повреждениями кожи, для защиты участков введения внутривенных катетеров и мест венопункции.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Повязка изготавливается различных размеров:  $6 \times 7 \pm 0,5$  см,  $9 \times 10 \pm 0,5$  см,  $9 \times 15 \pm 0,5$  см,  $10 \times 20 \pm 0,5$  см,  $10 \times 25 \pm 0,5$  см с шириной впитывающего слоя  $3 \times 4 \pm 0,5$  см,  $5 \times 6 \pm 0,5$  см,  $5 \times 10 \pm 0,5$  см,  $5 \times 15 \pm 0,5$  см,  $5 \times 20 \pm 0,5$  см соответственно и массой, не более 10 г.

Полотно повязки не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Повязка не должна иметь складок и сборок.

Поверхность повязки должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Сопротивление отслаиванию от металлической пластины должно быть не менее 0,35 Н/см.

Стерилизация повязки в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно повязки не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

Для изготовления повязки используются высококачественные нетканые материалы.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достав изделие, потребуется удалить одну часть бумажного покрытия и прикрепить повязку к ране, деликатно разгладить и прижать. Затем снять бумажное покрытие и аналогичным способом прикрепить вторую часть. Подушечка при этом должна полностью покрыть рану. Повязка меняется в индивидуальном режиме, но не реже, чем один раз в три дня.

## **10.16. ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ**

### **ВВЕДЕНИЕ**

Перчатки медицинские (далее – перчатки), входят в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Перчатки предназначены для защиты рук медицинских работников и предупреждения распространения инфекции.

### **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Перчатки изготавливаются различных размеров XS, S, M, L, XL и массой, не более 15 г.

Поверхность перчаток должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация перчаток в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Материал перчаток не должен выделять резкого или гнилостного запаха.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий применения медицинских перчаток.

## 10.17. МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ИЗ НЕТКАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

### ВВЕДЕНИЕ

Маска медицинская из нетканых материалов (далее – маска), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### НАЗНАЧЕНИЕ

Маска медицинская из нетканых материалов предназначена для защиты от различных возможных патогенных микробов, микроорганизмов, вирусов, бактерий, загрязняющих веществ из воздуха.

Маска применяется в отделениях ЛПУ (в т.ч. операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологии, в клиниках, массажных салонах, спарсалонах, и в любых учреждениях, где необходимо поддерживать высокий уровень асептики.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маска изготавливается из высококачественного нетканого материала, который имеет свойства:

- повышенные прочностные характеристики
- высокие параметры фильтрации
- улучшенные барьерные свойства
- высокие водоотталкивающие качества
- хорошая впитываемость
- воздухопроницаемость
- способствует равномерному теплообмену
- низкая статичность
- невысокие коэффициенты упругости
- отсутствие «ворсистости» и осыпание материала
- улучшенные тактильные качества

Маска изготавливается размером с длиной  $17,5 \pm 0,5$  см и шириной  $9,5 \pm 0,5$  см и массой, не более 3 г.

Полотно маски не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Поверхность маски должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация маски в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно маски не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий использования маски медицинской.

## **10.18. ШПРИЦ ОДНОРАЗОВЫЙ**

### **ВВЕДЕНИЕ**

Шприц одноразовый (далее – шприц) входит в комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Шприц одноразовый предназначен для подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций.

### **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Шприц изготавливается объемом 2,0 мл 3,0 мл 5,0 мл 10,0 мл 20,0 мл и массой, не более 10 г.

Шприц изготавливается стерильным.

Поверхность шприца должна быть без видимых дефектов, пятен, загрязнений.

Стерилизация шприца в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий при работе с одноразовыми шприцами.

## **10.19. ШПРИЦ ЖАНЕ**

### **ВВЕДЕНИЕ**

Шприц Жане (далее – шприц) входит в комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Шприц Жане предназначен для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания внутренних полостей пациента, а так же для проведения энтерального питания.

### **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Шприц изготавливается объемом 150 мл и массой, не более 70 г.

Шприц изготавливается стерильным.

Поверхность шприца должна быть без видимых дефектов, пятен, загрязнений.

Стерилизация шприца в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий медицинского вмешательства.

## **10.20. ЗАГУБНИК ПОЛИМЕРНЫЙ**

### **ВВЕДЕНИЕ**

Загубник полимерный (далее – загубник) входит в комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Загубник полимерный предназначен для защиты гибкого эндоскопа, гастроскопов и бронхоскопов от случайного прокусывания тубуса пациентом при проведении эндоскопического исследования, для введения гибких эндоскопов, трубок при проведении эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Загубник обеспечивает сохранность тубуса эндоскопа при рефлекторном сжатии зубов пациентом.

### **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Загубник изготавливается размерами: Внешние размеры:  $27 \pm 1,0$  х  $40 \pm 1,0$  х  $50 \pm 1,0$  мм  
Внутренний размер окна:  $30 \pm 1,0$  мм х  $17 \pm 1,0$  мм и массой, не более 8 г.

Поверхность загубника должна быть без видимых дефектов, пятен, загрязнений.

Стерилизация загубника в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий медицинского вмешательства.

## 10.21. НОЖ ДЛЯ СНЯТИЯ ШВОВ

### ВВЕДЕНИЕ

Нож для снятия швов (далее – нож) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### НАЗНАЧЕНИЕ

Нож для снятия швов предназначен для разрезания хирургических нитей. Заостренный кончик ножа имеет серповидную форму, что позволяет с легкостью, без излишнего травмирования, разрезать швы для их дальнейшего удаления.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нож для снятия швов изготавливается различной формой по стандартам: № 9, 12, 13, 40.

Масса ножа должна быть, не более 8 г.

Нож изготавливается стерильным.

Поверхность ножа должна быть без видимых дефектов, пятен, загрязнений.

Стерилизация ножа в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

На поверхности ножа не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов и других загрязнений (окалин, материалов шлифовки, полировки и следов смазки).

Твердость по Роквеллу (HRC) у ножа должна обеспечиваться согласно нормам ГОСТ 19126.

Твердость по Роквеллу (HRC) ножа должна быть в пределах от 51 до 58 HRC.

Шероховатость поверхности Ra ножа должна быть, не более 1,25 мкм. Шероховатость режущей кромки Ra ножа должна быть в пределах от 0,05 до 0,63 мкм.

Нож должен быть коррозионно-стойким в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения.

Ширина режущей кромки ножа должна соответствовать ГОСТ 21240 и составлять, не более 3 мкм.

Режущая кромка ножа должна быть острой по всей длине и не должна иметь трещин, зазубрин и выкрошенных мест.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

- 1) Выберите необходимый размер ножа (№ 9, 12, 13, 40);
- 2) Предварительно убедившись в целостности потребительской упаковки. Убедитесь в том, что срок хранения (стерильности) не истек. Использовать продукцию с нарушенной потребительской упаковкой или истекшим сроком годности ЗАПРЕЩЕНО.
- 3) Вскройте потребительскую упаковку и извлеките нож, соблюдая правила асептики;
- 4) Снимите защитный колпачок. Нож готов к использованию.
- 5) После использования утилизируйте нож в соответствии с инструкцией, утвержденной руководителем организации, осуществляющей медицинскую деятельность. Инструкция определяет ответственных сотрудников и процедуру обращения с медицинскими отходами в данной организации.

## **10.22. ЗАЖИМ ПОЛИМЕРНЫЙ**

### **ВВЕДЕНИЕ**

Зажим полимерный (далее – зажим) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Зажим полимерный предназначен для зажима простыни и захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов во время лечебных процедур и профилактических осмотров.

### **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Зажим изготавливается с длиной  $14 \pm 0,5$ ;  $24 \pm 0,5$  см и массой, не более 15 и 26 г соответственно.

Поверхность зажима должна быть без видимых дефектов, пятен, загрязнений.

Стерилизация зажима в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий при эксплуатации зажима.

## **10.23. ПИНЦЕТ ПОЛИМЕРНЫЙ**

### **ВВЕДЕНИЕ**

Пинцет полимерный (далее – пинцет) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Пинцет полимерный предназначен для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов во время лечебных процедур и профилактических осмотров.

### **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Пинцет изготавливается с длиной  $12,5 \pm 0,5$ ,  $15 \pm 0,5$ ,  $20 \pm 0,5$ ,  $25 \pm 0,5$  и массой, не более 8.

Поверхность пинцета должна быть без видимых дефектов, пятен, загрязнений.

Стерилизация пинцета в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий медицинского вмешательства.

## **10.24. ЛОТОК-ЕМКОСТЬ**

### **ВВЕДЕНИЕ**

Лоток-емкость (далее – лоток) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Лоток-емкость предназначен для размещения, хранения и утилизации изделий и расходных материалов из медицинского комплекта.

## **10.25. КОНТЕЙНЕР С ГРАДУИРОВКОЙ**

### **ВВЕДЕНИЕ**

Контейнер с градуировкой (далее – контейнер) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Контейнер с градуировкой предназначен для сбора, хранения и транспортировки образцов биологических материалов (моча, кал, мокрота, грудное молоко, сперма, рвотные массы, раневое отделяемое, а также иных твердых или жидких образцов, кроме крови), для дальнейшего лабораторного исследования.

### **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Контейнер изготавливается объемом 60 и 120 мл и массой, не более 10 и 18 г соответственно.

Поверхность контейнера должна быть без видимых дефектов, пятен, загрязнений.

Стерилизация контейнера в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действия при эксплуатации контейнера с градуировкой.

## **10.26. ВОЗДУХОВОД ПОЛИМЕРНЫЙ**

### **ВВЕДЕНИЕ**

Воздуховод полимерный (далее – воздуховод) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).  
Воздуховод представляет собой прозрачную изогнутую трубку, имеющую овальное сечение.

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Воздуховод полимерный предназначен для обеспечения проходимости дыхательных путей и доступа дыхательного объема воздуха больному, испытывающий затруднения или невозможность в способности дыхания.

### **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Воздуховод изготавливается размерами: №1: 20 мм, №2: 25 мм, №3: 40 мм, №4: 55 мм и массой 8, 10, 14, 18 г соответственно.

Поверхность воздуховода должна быть гладкой, без видимых дефектов, пятен, загрязнений.

Стерилизация воздуховода в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий при эксплуатации воздуховода.

## 11. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Медицинские комплекты, поставляемые потребителю, не токсичны, не содержат веществ, представляющих опасность для окружающей среды и здоровья человека.

Изделия не оказывают сенсibiliзирующего или раздражающего действия.

В состав готовых комплектов не входят компоненты и вещества, требующие при производстве особо строгого соблюдения требований производственной и пожарной безопасности.

При изготовлении комплектов должны соблюдаться требования пожарной безопасности.

Производственные помещения должны быть оборудованы всеми необходимыми средствами пожаротушения.

Требования к охране окружающей среды

Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почвы и воды в результате неорганизованного сжигания и захоронения отходов материалов на территории предприятия-изготовителя или вне его, а также произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах.

Отходы производства должны подвергаться утилизации.

Допускается утилизацию отходов материалов и химикатов в процессе производства производить на договорной основе с организацией, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

## 12. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| - Покрытие для инструментального стола 90-160 x 40-120 см           | 0-10 шт. |
| - Простыня хирургическая малая 70-190 x 50-150 см                   | 0-10 шт. |
| - Простыня хирургическая большая 170-390 x 90-240 см                | 0-10 шт. |
| - Полотенце для рук 40-90 x 40-90 см                                | 0-10 шт. |
| - Салфетка хирургическая 30-90 x 30-90 см                           | 0-10 шт. |
| - Салфетка для пациента бумажно-полиэтиленовая 40,43,45x30,33,35 см | 0-10 шт. |
| - Салфетка впитывающая 3-40 x 3-40 см                               | 0-50 шт. |
| - Бандаж гемостатический для гемодиализа 7,2x3 см                   | 0-10 шт. |
| - Тупфер 10-18x1,5 см                                               | 0-50 шт. |
| - Тампон круглый Ø1,5-7 см                                          | 0-50 шт. |
| - Тампон треугольный 3,5-6,5x3,5-6,5x3,5x6,5                        | 0-50 шт. |
| - Фиксирующий бинт эластичный 400x4-12                              | 0-10 шт. |
| - Фиксирующая лента 10-18x1,5-4,5 см                                | 0-50 шт. |
| - Послеоперационная повязка 6x7, 9x10, 9x15, 10x20, 10x25 см        | 0-10 шт. |
| - Перчатки медицинские XS, S, M, L, XL                              | 0-10 шт. |
| - Маска медицинская из нетканых материалов 17,5x9,5 см              | 0-10 шт. |
| - Шприц одноразовый 2,0 мл 3,0 мл 5,0 мл 10,0 мл 20,0 мл            | 0-20 шт. |
| - Шприц Жане 150,0 мл                                               | 0-10 шт. |
| - Загубник полимерный 27 x 40 x 50 мм                               | 0-10 шт. |
| - Нож для снятия швов № 9,12,13,40                                  | 0-15 шт. |
| - Зажим полимерный 14, 24 см                                        | 0-15 шт. |
| - Пинцет полимерный 12,5, 15, 20, 25 см                             | 0-15 шт. |
| - Лоток-емкость 165-187x134-137x17-63 см                            | 0-10 шт. |
| - Контейнер с градуировкой №1 - 60 мл, №2 - 120 мл                  | 0-10 шт. |
| - Воздуховод полимерный №1: 20 мм, №2: 25 мм, №3: 40 мм, №4: 55 мм  | 0-10 шт. |
| - Инструкция по применению                                          | 1 шт.    |

### **13. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Использовать однократно. При повреждении упаковки комплекта изделие считается не стерильным. Использовать готовые медицинские комплекты разрешено лишь специально обученному медицинскому персоналу в условиях стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждений, в процедурных и перевязочных кабинетах и в специализированных отделениях клиник и больниц. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

### **14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ**

Комплект имеет полностью законченную конструкцию и не требует в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту, за исключением утилизации в соответствии со стандартами медицинского учреждения.

### **15. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Медицинский комплект должен быть пригодным для эксплуатации в условиях УХЛ климата по ГОСТ 15150 категории размещения 4.2, при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С, относительной влажности не выше 80% при температуре 25 °С и атмосферном давлении от 86 до 106,7 кПа.

Не допускается контакт комплекта с открытым пламенем и нагревательными приборами.

### **16. МАРКИРОВКА**

Маркировка содержит следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- адрес предприятия-изготовителя;
- обозначение медицинского комплекта по настоящим техническим условиям;
- состав изделий и расходных материалов;
- размеры;
- дату изготовления (месяц, год);
- гарантии изготовителя;
- указания по утилизации;
- слово «стерильно»;
- слова «однократного применения» или «одноразового пользования»;
- отметку о прохождении технического контроля;
- сведения о сертификации, знак по ГОСТ Р 50460 и единый знак обращения на

рынке государств – членов Таможенного союза.

Допускается приводить дополнительную информацию, в т. ч. рекламного характера.

## **17. УПАКОВКА**

Упаковка обеспечивает сохранение стерильности комплекта.

Все изделия и расходные материалы должны укладываться в единую потребительскую упаковку из полиэтилена и бумаги.

Вскрытие упаковки должно обеспечиваться без применения режущего инструмента.

Покрытие в составе комплекта в единой потребительской упаковке может быть уложено в ящики из гофрированного картона. Масса брутто ящика не превышает 20 кг.

Допускается применять другие виды упаковочных средств, в т. ч. изготавливаемые по чертежам предприятия-производителя комплектов, обеспечивающие их сохранность.

## **18. ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортирование комплекта осуществляется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования:

- температура – от  $-50$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ ;
- влажность: до 100% при  $25^{\circ}\text{C}$ .

При погрузке, выгрузке и транспортировании должны быть приняты меры, предохраняющие комплект от повреждений и загрязнений.

## **19. ХРАНЕНИЕ**

Медицинский комплект хранят в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, исключая вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от минус 50 до плюс  $40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности не более 95%.

При хранении должны быть приняты меры, предохраняющие комплект от повреждений и загрязнений.

## **20. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок годности стерильных комплектов – 3 года со дня стерилизации.

Комплект не подлежит вторичному использованию. Запрещается использование по истечении срока годности.

## 21. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Использованные комплекты должны быть утилизированы в соответствии с действующими правилами и нормами в лечебных учреждениях согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

Не использованные комплекты специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют.

Комплекты не взрывоопасны, не способны самовозгораться, при поднесении открытого огня горят без взрыва.

При пожаре для тушения следует использовать огнетушители, асбестовую ткань, воду, песок. По вопросам утилизации обращаться: ООО «СТЕРРА», 420021, РТ, г. Казань, ул. Салиха Сайдашева 34а., тел.: (987)061-14-26, e-mail: info.sterra@gmail.com.

## 22. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Отметка о продаже

Категория изделия \_\_\_\_\_

Производитель \_\_\_\_\_

Штамп  
продавца

Дата продажи \_\_\_\_\_

Организация продавец \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Изделие проверено, повреждений не имеет. Стерильно.

С правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Гарантийный срок хранения – 3 года со дня стерилизации.

По вопросам гарантии обращаться: ООО «СТЕРРА», 420021, РТ, г. Казань, ул. Салиха Сайдашева 34а., тел: (987)061-14-26, e-mail: info.sterra@gmail.com.

**ВНИМАНИЕ!** Следите за правильным заполнением гарантийного талона. Все графы талона (за исключением граф для производителя/поставщика) должны быть заполнены. При неточном или неполном заполнении талона гарантия на изделие считается утраченной.

Прошито и пронумеровано

43 (листов)

*Исход. РР.*

