

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ВИТА»



Чаус Н.Н.
2023 г.

СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ
по ТУ 32.50.30-003-48837523-2019

Инструкция по применению
ПТИС.324159.001 И

г. Владивосток

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 2 из 77

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1	Назначение и условия применения	4
1.2	Показания	4
1.3	Противопоказания	4
1.4	Побочные эффекты	4
1.5	Меры предосторожности	4
1.6	Принцип действия и конструкция стола	5
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	38
2.1	Основные параметры и характеристики.....	38
2.2	Требования к сырью, материалам и покупным изделиям	54
2.3	Требования к надежности	61
2.4	Комплектность	61
2.5	Маркировка	63
2.6	Упаковка	64
3	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	65
4	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	66
4.1	Эксплуатационные ограничения	66
4.2	Подготовка к эксплуатации	66
4.3	Порядок работы с изделием.....	66
5	УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.....	67
6	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	68
7	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	68
8	ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	69
9	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	70
10	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	71
11	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	72
12	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	73
	ПРИЛОЖЕНИЕ А. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	75
	Лист регистрации изменений.....	77

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 3 из 77

Настоящая инструкция распространяется на Стол медицинский (далее – Стол) и представляет собой документ, содержащий сведения о назначении, конструкции, принципе действия и характеристиках стола, необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования, хранения, обслуживания и утилизации, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

 Информация, важная для безопасного применения стола отмечена предупредительным треугольником с восклицательным знаком. Этим указаниям следует уделять особое внимание.

 К эксплуатации допускается медицинский персонал и пациенты, детально изучившие настоящую инструкцию по применению.

 **ВНИМАНИЕ! Модификация изделия не допускается!**

 Ремонт изделия может осуществляться только квалифицированным специально обученным персоналом сервисных центров.

По всем вопросам, касающимся использования стола, необходимо обращаться к изготовителю:

ООО «ВИТА», 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206

Тел.: 8 423 279-59-49

E-mail: vita@vita-vdk.ru

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 2.106, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.610.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 4 из 77

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение и условия применения

Стол предназначен для использования в специальных медицинских помещениях (манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клинико-диагностические и бактериологические помещения), для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.

Сфера применения: в условиях лечебно-профилактических учреждений.

В зависимости от потенциального риска применения стол относится к классу 1 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям стол относится к виду УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий при эксплуатации стол относится к группе 1 по ГОСТ Р 50444.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации стол относится к классу Г по ГОСТ Р 50444.

1.2 Показания

Для хранения медицинских изделий и проведения медицинских процедур или лабораторных исследований.

1.3 Противопоказания

Возможна индивидуальная непереносимость материала.

1.4 Побочные эффекты

Побочные эффекты не наблюдаются при соблюдении требований настоящей инструкции по применению, показаний и противопоказаний.

1.5 Меры предосторожности

Внимание!

- Используйте стол только в соответствии с данной инструкцией.
- Уход за столом осуществлять в соответствии с данной инструкцией.
- Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы, не предназначенные для ухода за столом.
- Не следует ставить на поверхность стола горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 5 из 77

1.6 Принцип действия и конструкция стола

Стол представляет собой широкую поверхность, укрепленную на одной или нескольких опорах, и предназначен для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов. Стол в зависимости от варианта исполнения может быть оснащен надстройкой над столешницей с полками, расположенной над частью ее поверхности, и подстольем с закрывающимися дверями, полками и (или) выдвижными ящиками.

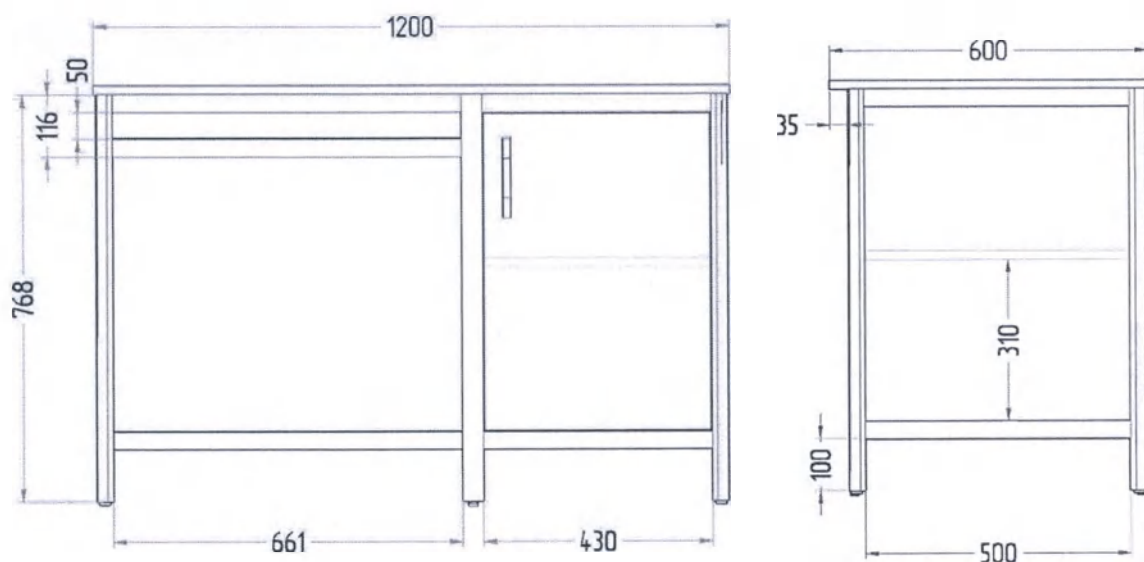


Рисунок 1 - Стол медицинский одностумбовый с дверью (Арт. СЛ-001)

Таблица 1 - Размеры стола медицинского одностумбового с дверью (Арт. СЛ-001)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота шкафа	Полка 1 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	1200	600	830	800	450	507

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И	
	Версия:	1.3
	Страница:	6 из 77

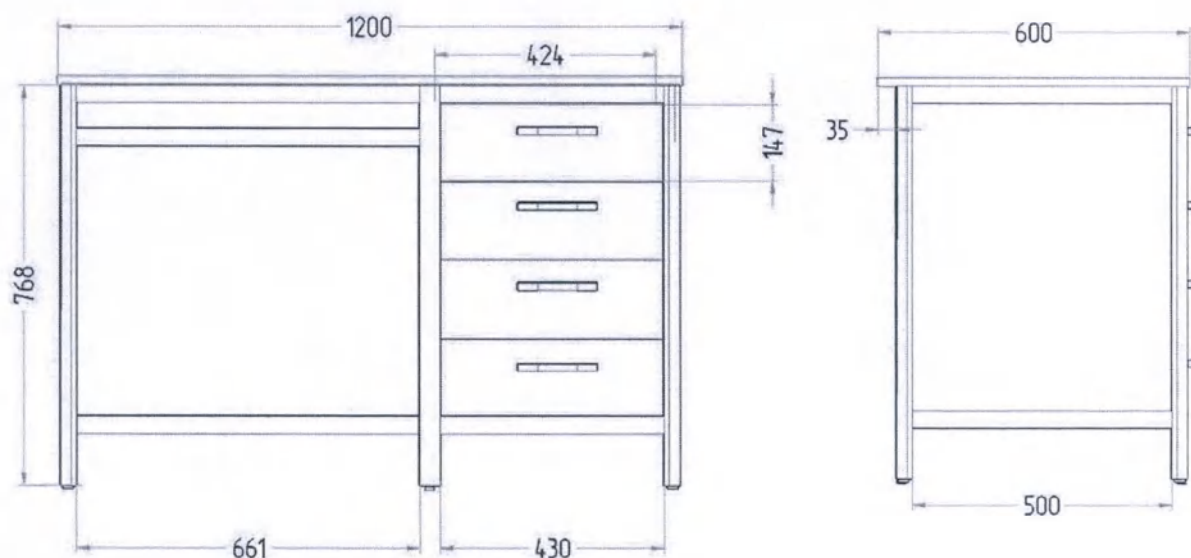


Рисунок 2 - Стол медицинский одностумбовый с четырьмя выдвижными ящиками
(Арт. СЛ-002)

Таблица 2 - Размеры стола медицинского одностумбового с четырьмя выдвижными ящиками
(Арт. СЛ-002)

Размеры, мм	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола	Ящики 4 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	1200	600	830	800	425	450

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И	
	Версия:	1.3
	Страница:	7 из 77

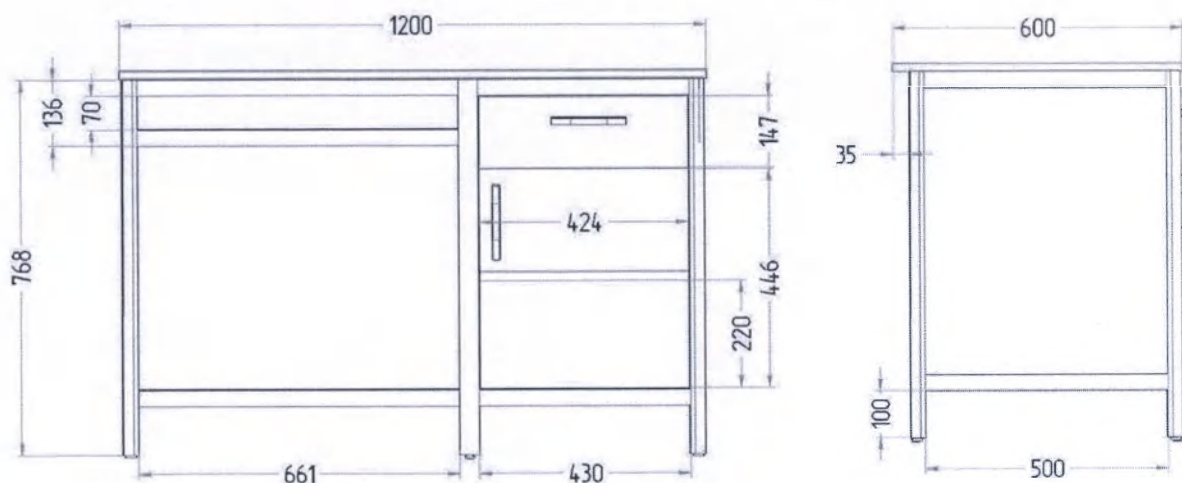


Рисунок 3 - Стол медицинский однотумбовый с выдвижным ящиком и дверью
(Арт. СЛ-003)

Таблица 3 - Размеры стола медицинского однотумбового с выдвижным ящиком и дверью
(Арт. СЛ-003)

	Ширина стола	Глубина стола	Максималь ная высота стола	Минималь ная высота стола	Полка 1 шт.		Ящик 1 шт.	
					Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
Размеры, мм	1200	600	830	800	450	507	425	450

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И	
	Версия:	1.3
	Страница:	8 из 77

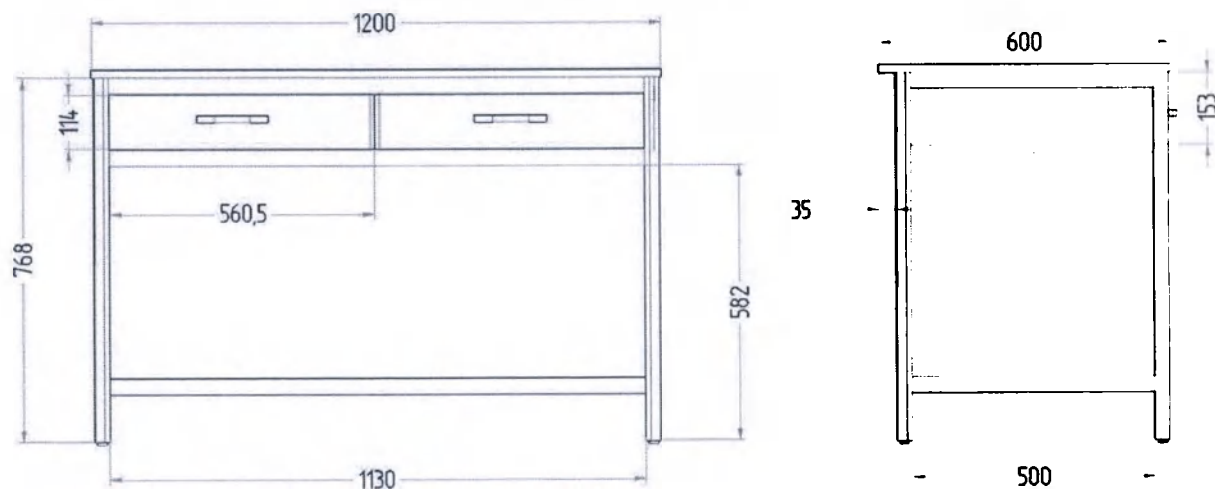


Рисунок 4 - Стол медицинский с двумя выдвижными ящиками (Арт. СЛ-004)

Таблица 4 - Размеры стола медицинского с двумя выдвижными ящиками (Арт. СЛ-004)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола	Ящики 2 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	1200	600	830	800	562	450

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 9 из 77

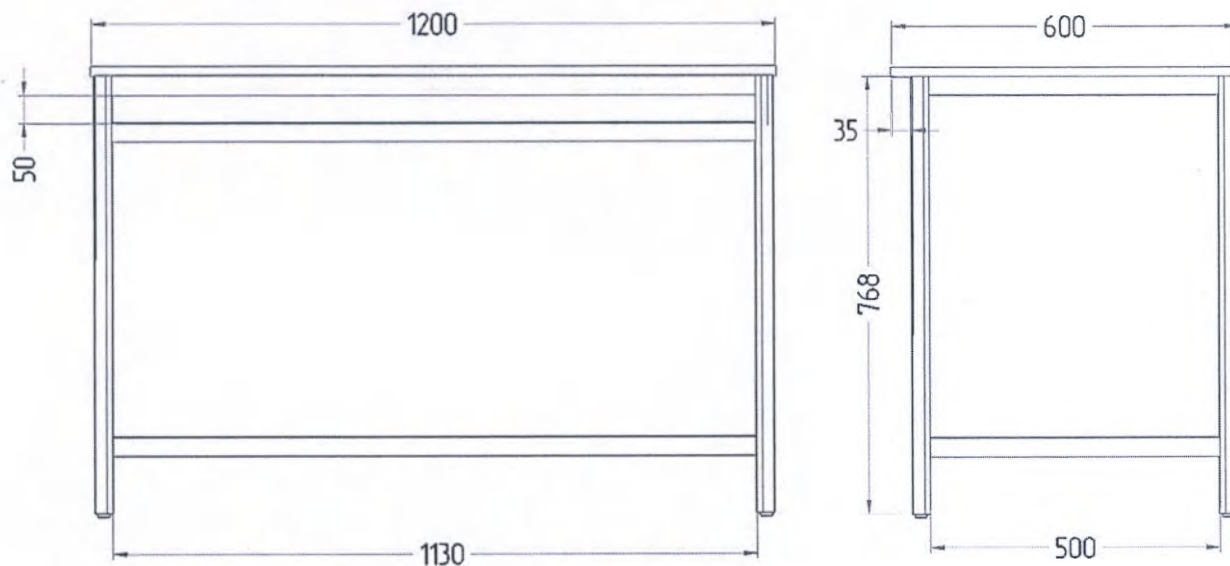


Рисунок 5 - Стол медицинский рабочий (Арт. СЛ-005)

Таблица 5 - Размеры стола медицинского рабочего (Арт. СЛ-005)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола
Размеры, мм	1200	600	830	800

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 10 из 77

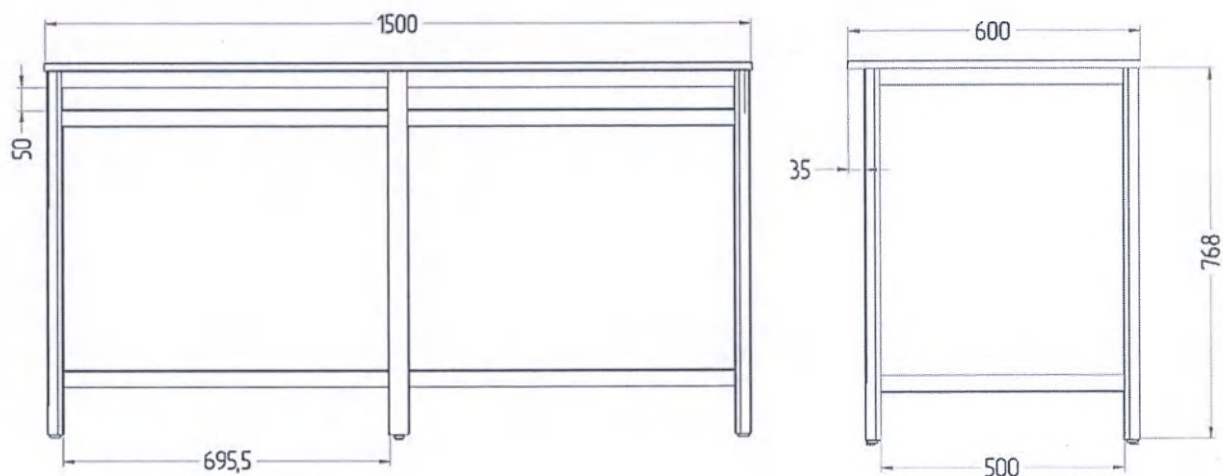


Рисунок 6 - Стол медицинский с перегородкой (Арт. СЛ-006)

Таблица 6 - Размеры стола медицинского с перегородкой (Арт. СЛ-006)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола
Размеры, мм	1500	600	830	800

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 11 из 77

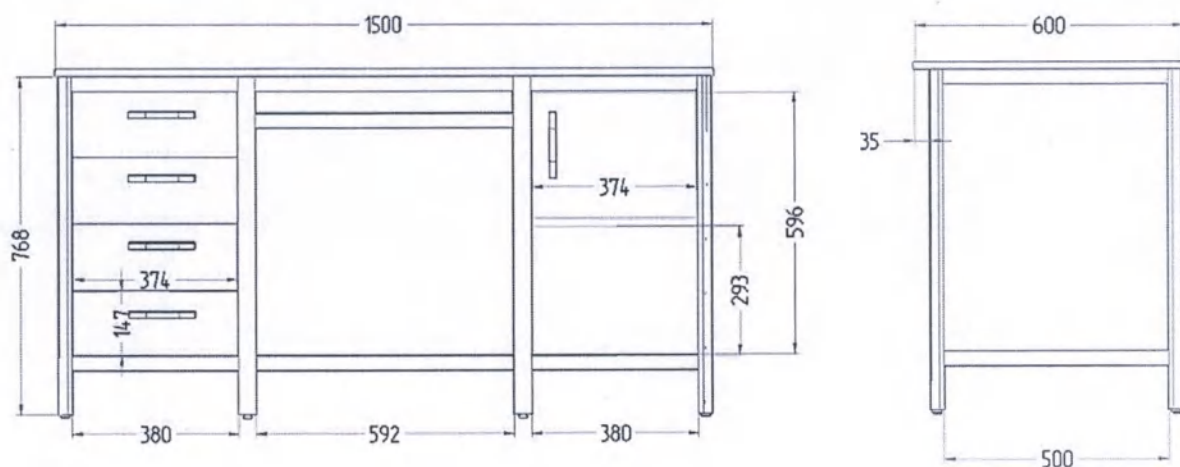


Рисунок 7 - Стол медицинский двухтумбовый с четырьмя выдвижными ящиками и дверью (Арт. СЛ-007)

Таблица 7 - Размеры стола медицинского двухтумбового с четырьмя выдвижными ящиками и дверью (Арт. СЛ-007)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола	Полка 1 шт.		Ящики 4 шт.	
					Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
Размеры, мм	1500	600	830	800	400	507	375	450

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 12 из 77

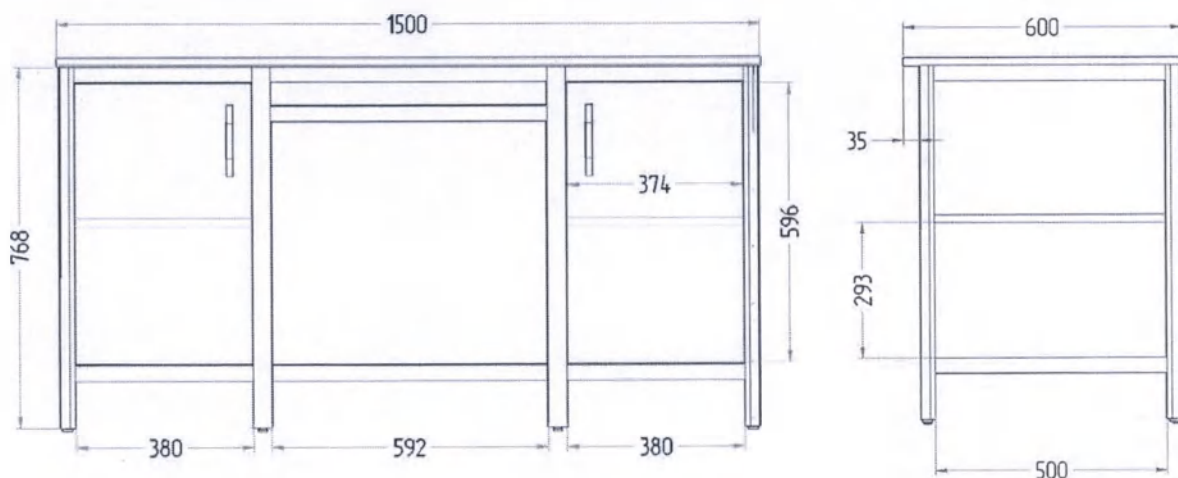


Рисунок 8 - Стол медицинский двухтумбовый (Арт. СЛ-008)

Таблица 8 - Размеры стола медицинского двухтумбового (Арт. СЛ-008)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола	Полки 2 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	1500	600	830	800	400	507

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 13 из 77

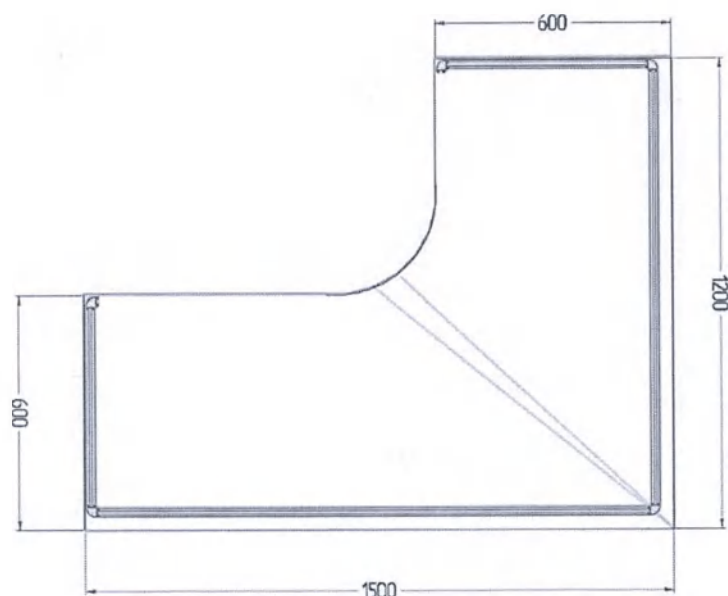
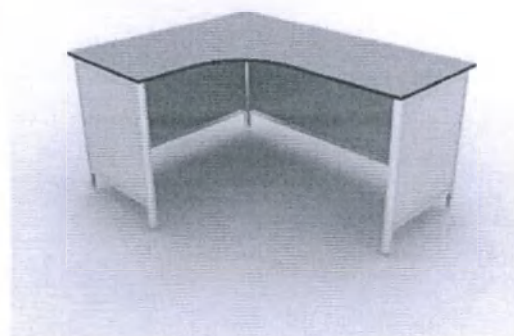
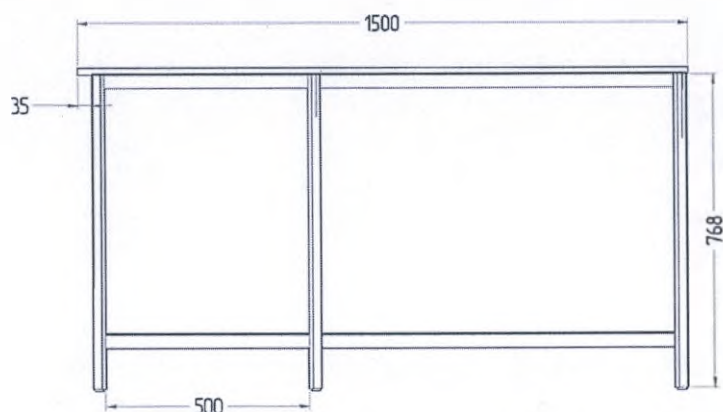


Рисунок 9 - Стол медицинский угловой с усиленной столешницей (Арт. СЛ-009)

Таблица 9 - Размеры стола медицинского угловой с усиленной столешницей (Арт. СЛ-009)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола
Размеры, мм	1500	1200	830	800

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 14 из 77

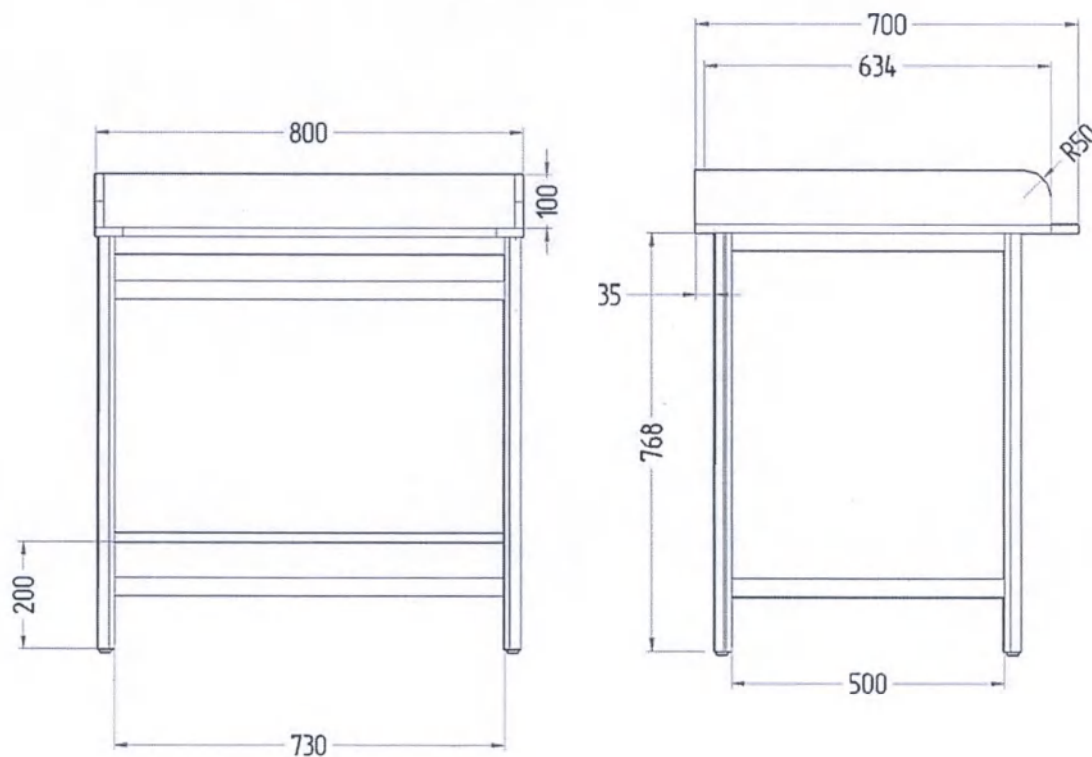


Рисунок 10 - Стол медицинский с бортиками (Арт. СЛ-010)

Таблица 10 - Размеры стола медицинского с бортиками (Арт. СЛ-010)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола	Полки 1 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	800	700	930	900	754	510

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 15 из 77

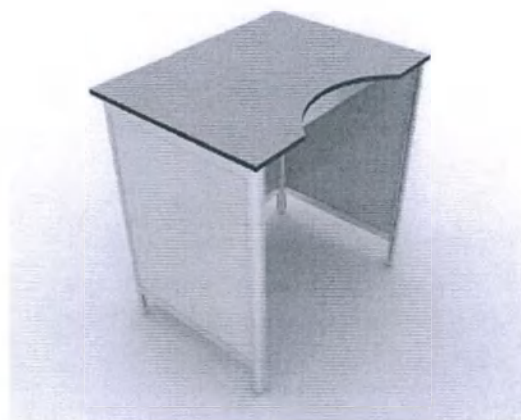
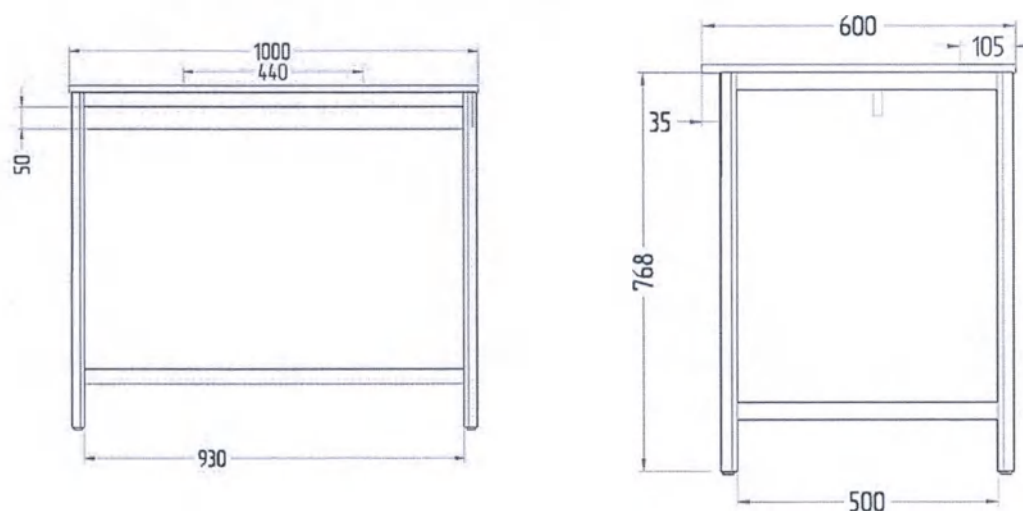


Рисунок 11 - Стол медицинский для работы с микроскопом (Арт. СЛ-011)

Таблица 11 - Размеры стола медицинского для работы с микроскопом (Арт. СЛ-011)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола
Размеры, мм	1000	600	830	800

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И	
	Версия:	1.3
	Страница:	16 из 77

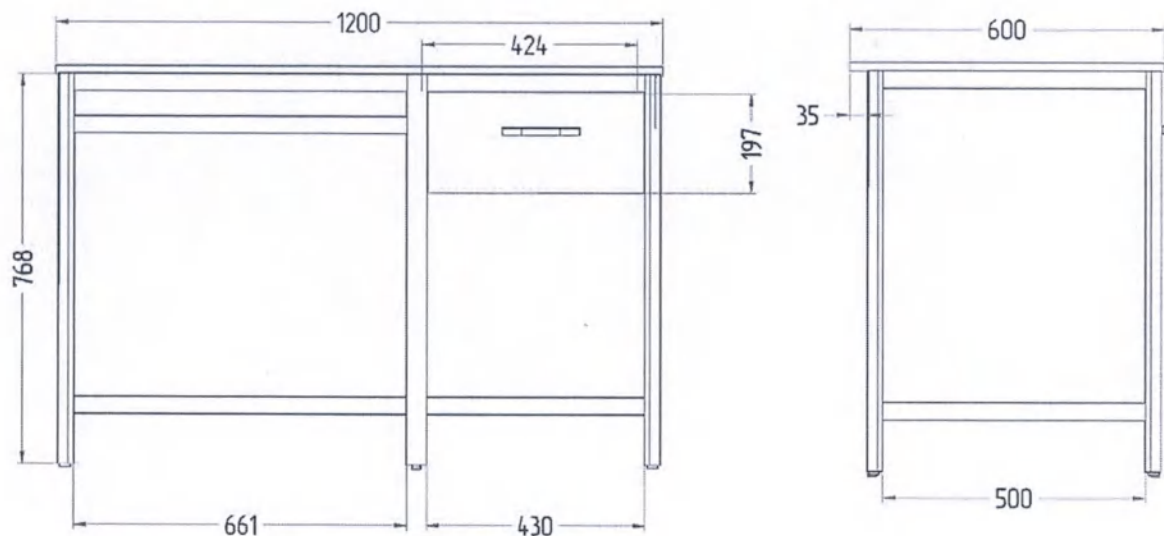


Рисунок 12 - Стол медицинский однотумбовый открытый с выдвижным ящиком
(Арт. СЛ-019)

Таблица 12 - Размеры стола медицинского однотумбового открытого с выдвижным ящиком
(Арт. СЛ-019)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола	Ящик 1 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	1200	600	830	800	425	450

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 17 из 77

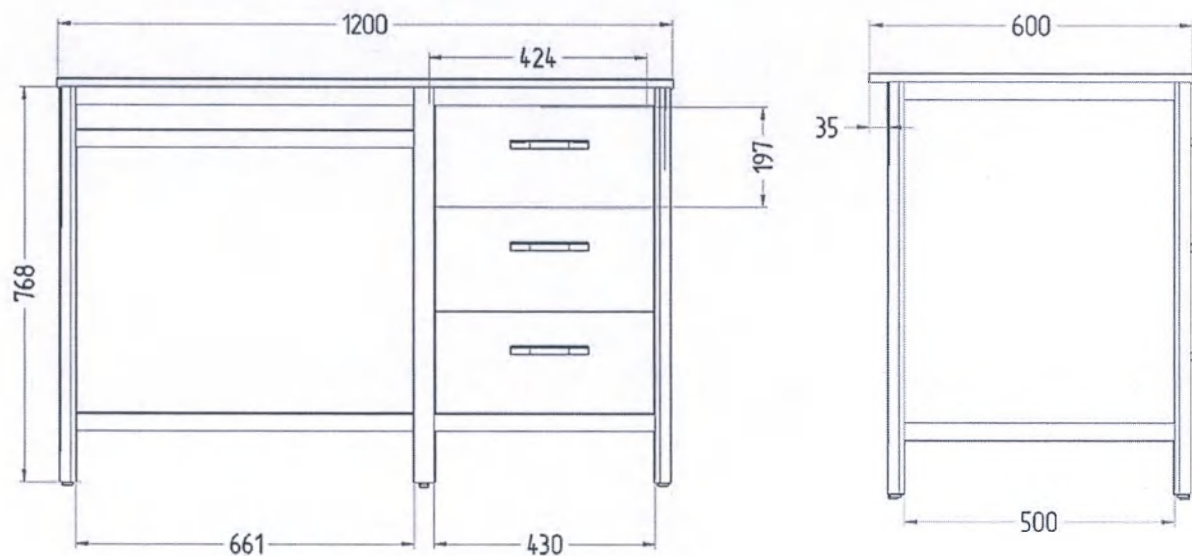


Рисунок 13 - Стол медицинский однотумбовый с тремя выдвижными ящиками
(Арт. СЛ-020)

Таблица 13 - Размеры стола медицинского однотумбового с тремя выдвижными ящиками
(Арт. СЛ-020)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола	Ящик 3 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	1200	600	830	800	425	450

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 18 из 77

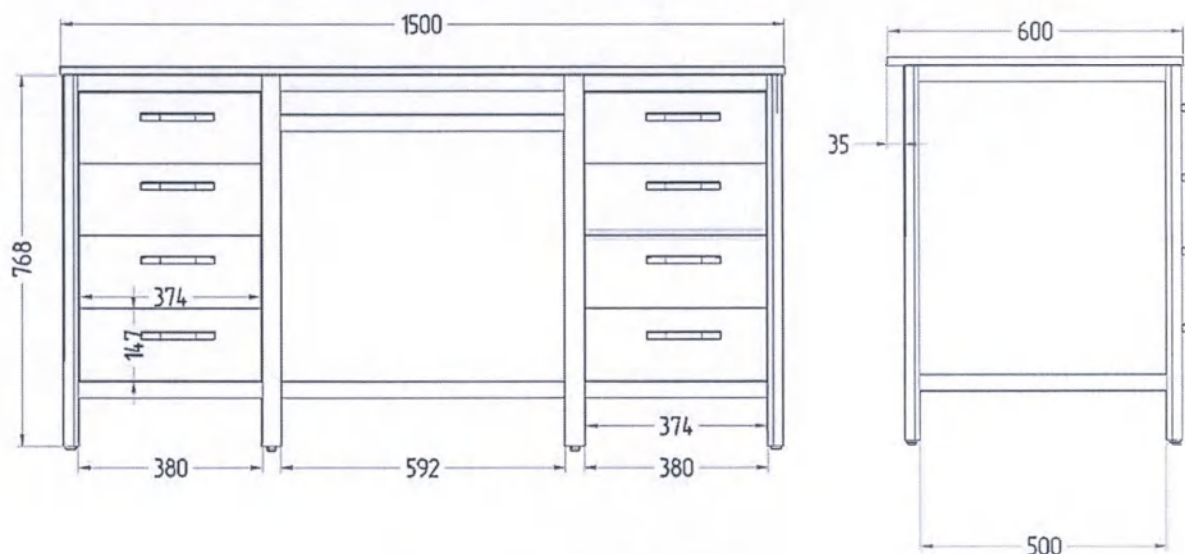


Рисунок 14 - Стол медицинский двухтумбовый с восьмью выдвижными ящиками
(Арт. СЛ-021)

Таблица 14 - Размеры стола медицинского одностумбового с восьмью выдвижными ящиками (Арт. СЛ-021)

Размеры, мм	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола	Ящики 8 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	1500	600	830	800	375	450

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 19 из 77

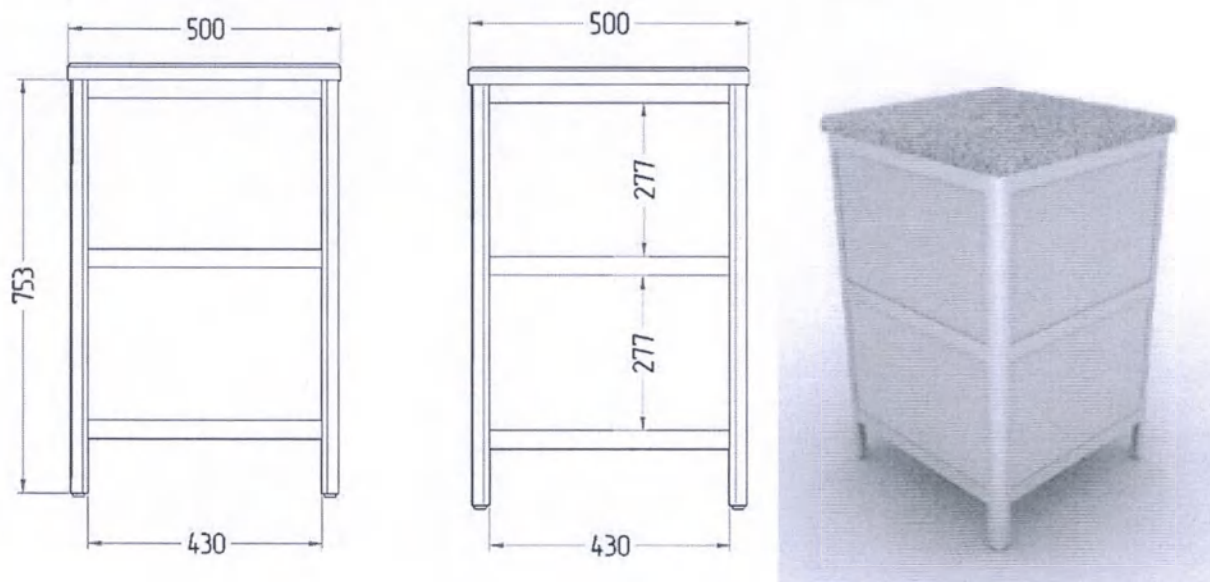


Рисунок 15 - Стол медицинский весовой (Арт. СВ-001)

Таблица 15 - Размеры стола медицинского весового (Арт. СВ-001)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола
Размеры, мм	500	500	830	800

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 20 из 77

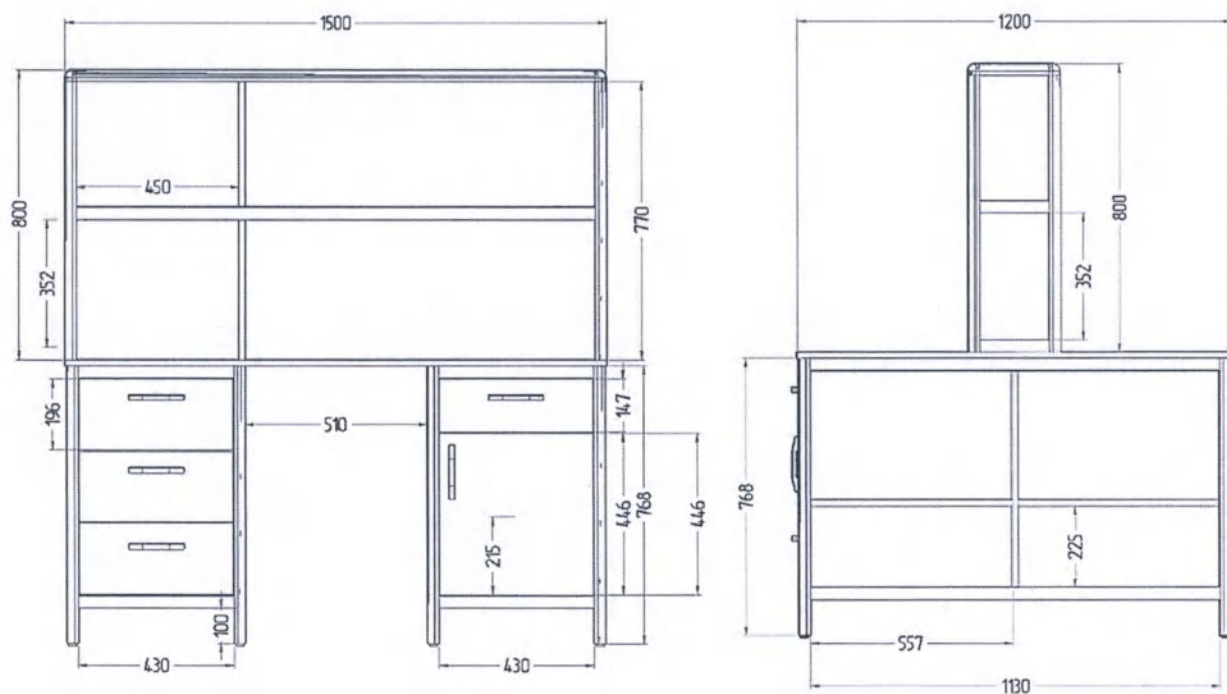


Рисунок 16 - Стол медицинский островной на два рабочих места (Арт. СО-001)

Таблица 16 - Размеры стола медицинского островного на два рабочих места (Арт. СО-001)

	Ширина стола	Глубина стола	Максималь ная высота стола	Минималь ная высота стола	Полка 2 шт.		Ящики 8 шт.	
					Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
Размеры, мм	1500	1200	1630	1600	450	560	425	450

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И	
	Версия:	1.3
	Страница:	21 из 77

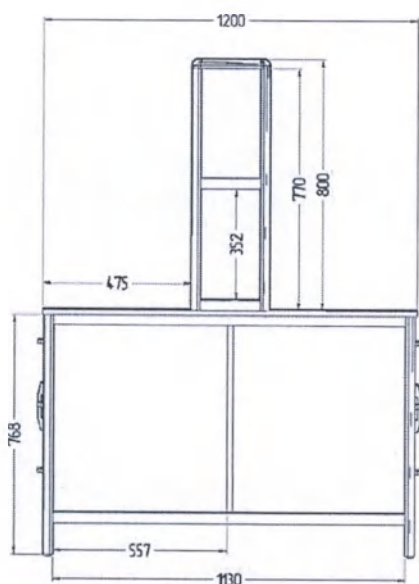
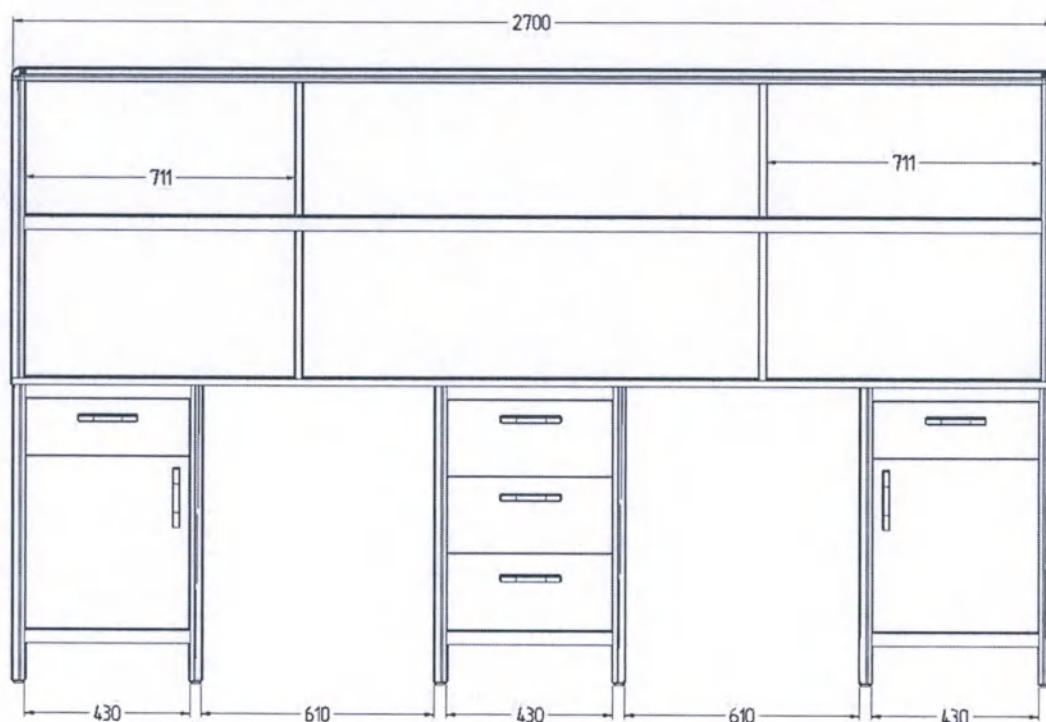


Рисунок 17 - Стол медицинский островной на четыре рабочих места (Арт. СО-002)

Таблица 17 - Размеры стола медицинского островного на четыре рабочих места (Арт. СО-002)

Размеры, мм	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола	Полка 4 шт.		Ящики 10 шт.	
					Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
	2700	1200	1630	1600	450	560	425	450

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 22 из 77

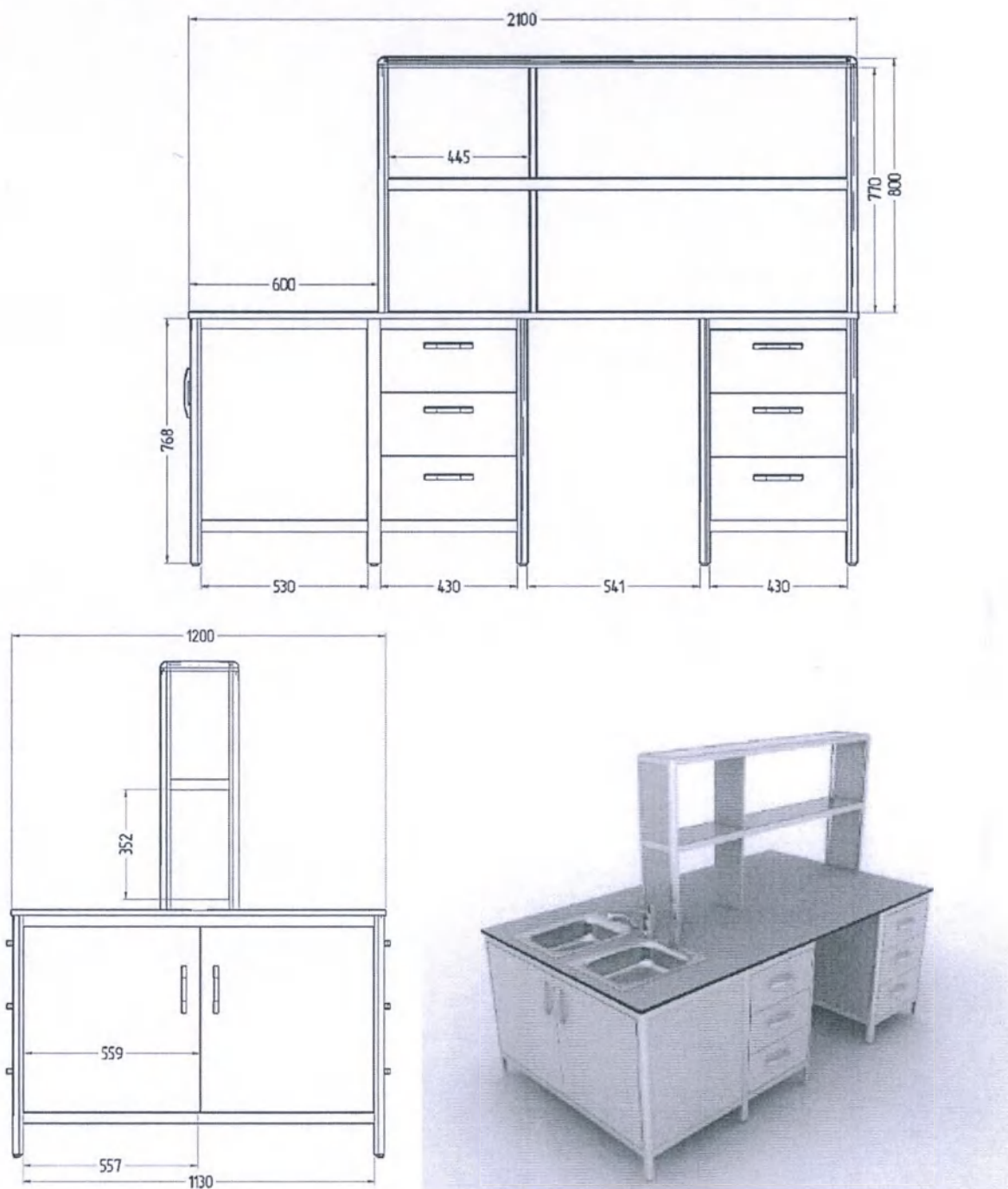


Рисунок 18 - Стол медицинский островной на два рабочих места с двумя мойками (Арт. СО-003)

Таблица 18 - Размеры стола медицинского островного на два рабочих места с двумя мойками (Арт. СО-003)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола	Ящики 12 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	2100	1200	1630	1600	425	460

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 23 из 77

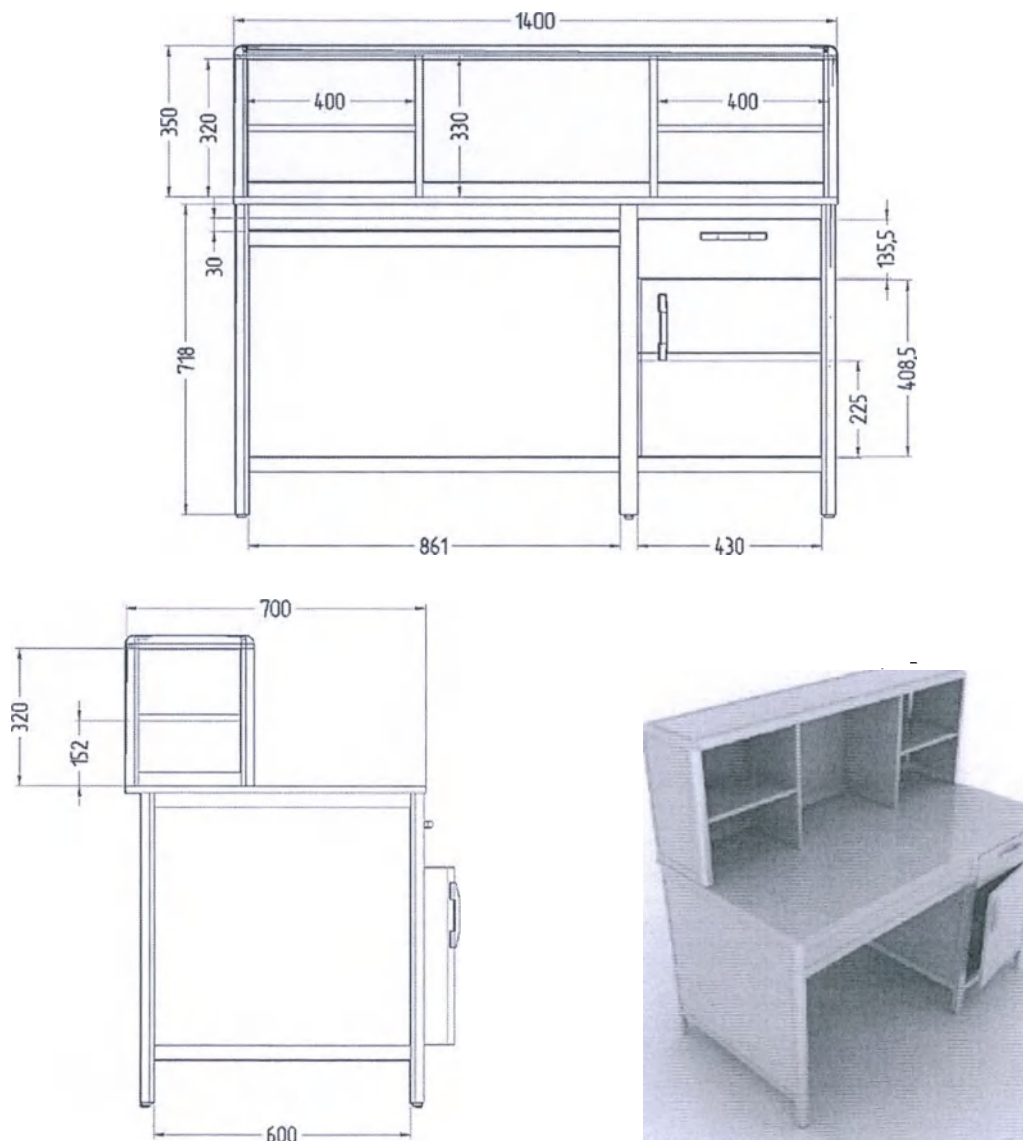


Рисунок 19 - Стол медицинский с надстройкой (Арт. СО-004)

Таблица 19 - Размеры стола медицинского с надстройкой (Арт. СО-004)

	Ширина на стола	Глубина на стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола	Полка 1 шт.		Ящик 1 шт.		Полки надстройки 2 шт.	
					Ширина	Глубина	Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
Размеры, мм	1400	700	1130	1100	450	607	425	450	400	252

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И	
	Версия:	1.3
	Страница:	24 из 77

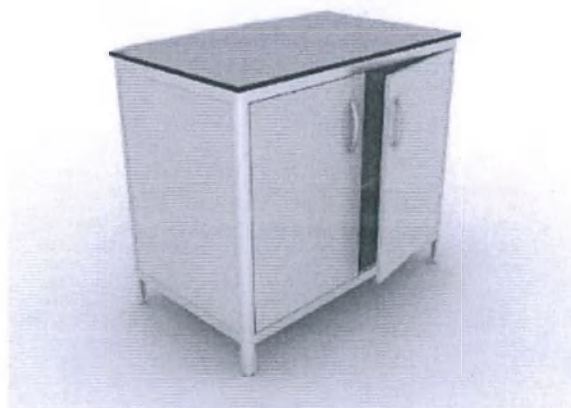
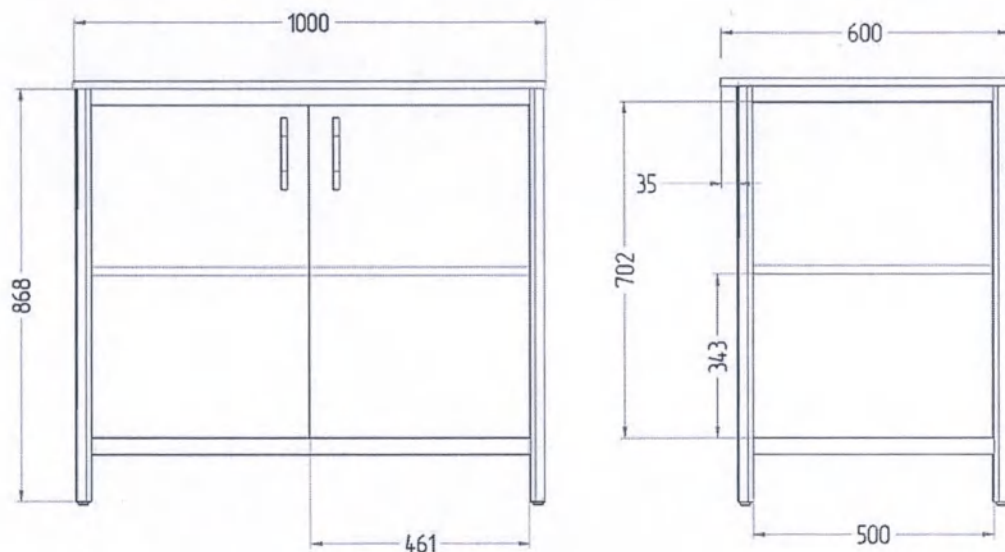


Рисунок 20 - Стол медицинский с двумя дверями (Арт. ШМП-001)

Таблица 20 - Размеры стола медицинского с двумя дверями (Арт. ШМП-001)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола	Полка 1 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	1000	600	930	900	950	507

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И	
	Версия:	1.3
	Страница:	25 из 77

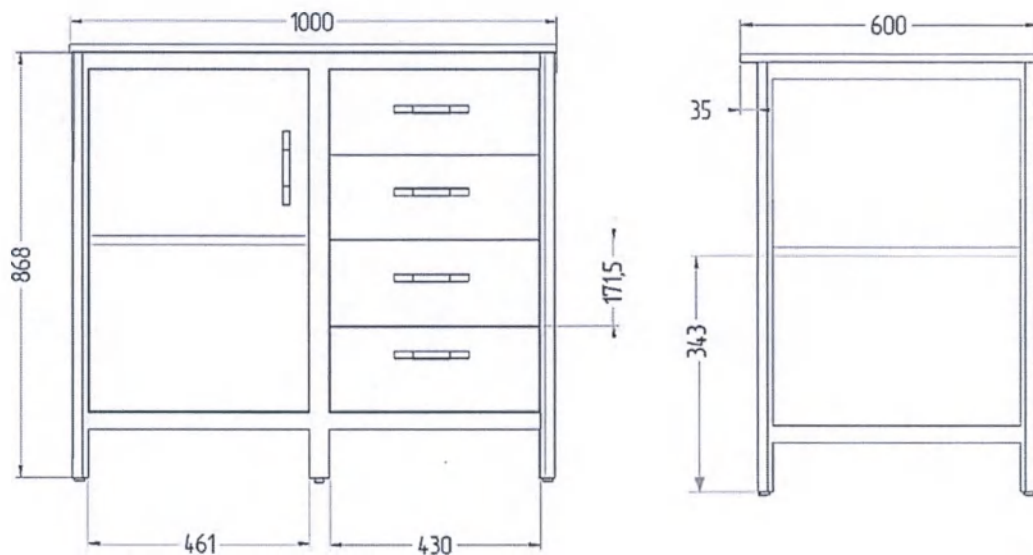


Рисунок 21 - Стол медицинский с четырьмя выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. ШМП-002)

Таблица 21 - Размеры стола медицинского с четырьмя выдвижными ящиками двухсекционного (Арт. ШМП-002)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола	Полка 1 шт.		Ящики 4 шт.	
					Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
Размеры, мм	1000	600	930	900	481	507	425	450

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 26 из 77

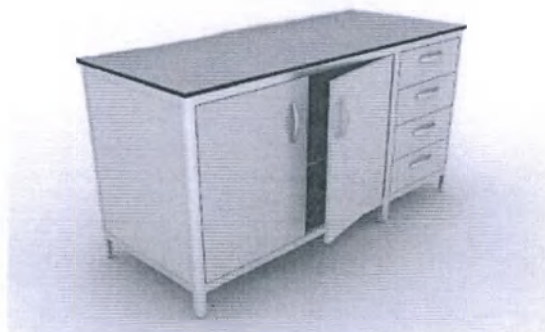
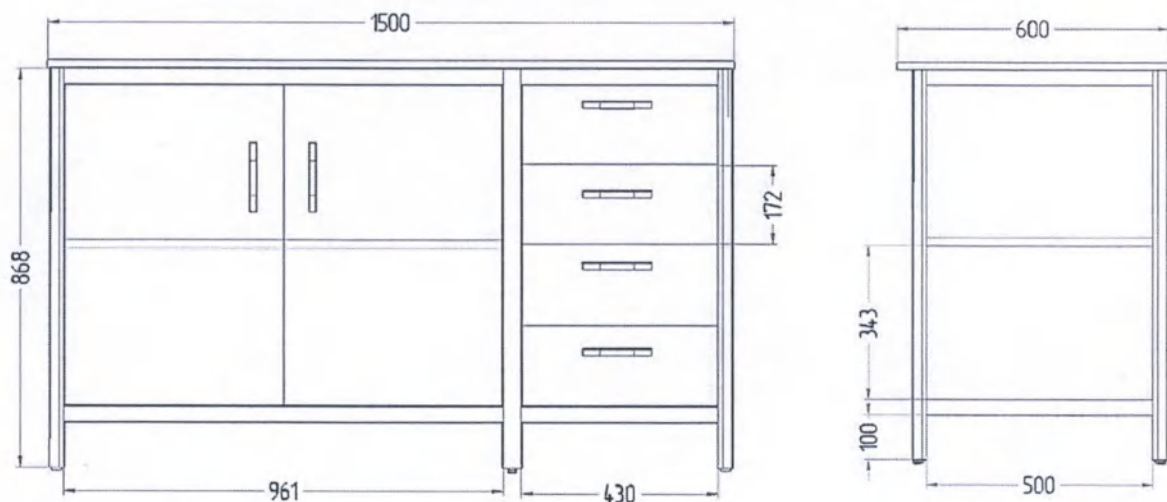


Рисунок 22 - Стол медицинский с четырьмя выдвижными ящиками и двумя дверями двухсекционный (Арт. ШМП-003)

Таблица 22 - Размеры стола медицинского с четырьмя выдвижными ящиками и двумя дверями двухсекционного (Арт. ШМП-003)

	Ширина стола	Глубина стола	Максималь ная высота стола	Минималь ная высота стола	Полка 1 шт.		Ящики 4 шт.	
					Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
Размеры, мм	1500	600	930	900	981	507	425	450

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 27 из 77

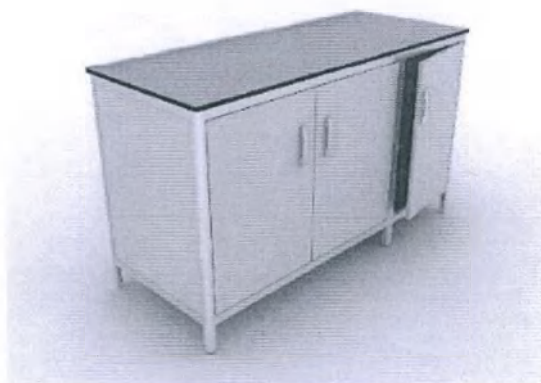
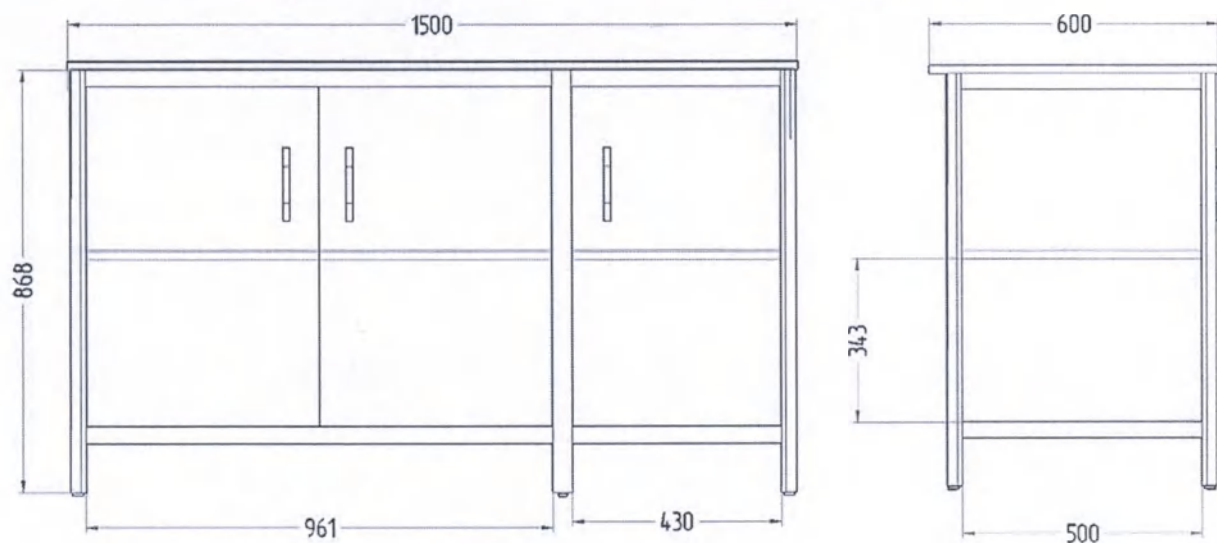


Рисунок 23 - Стол медицинский с тремя дверями двухсекционный
(Арт. ШМП-004)

Таблица 23 - Размеры стола медицинского с тремя дверями двухсекционного
(Арт. ШМП-004)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола	Полка длинная 1 шт.		Полка короткая 1 шт.	
					Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
Размеры, мм	1500	600	930	900	981	507	450	507

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 28 из 77

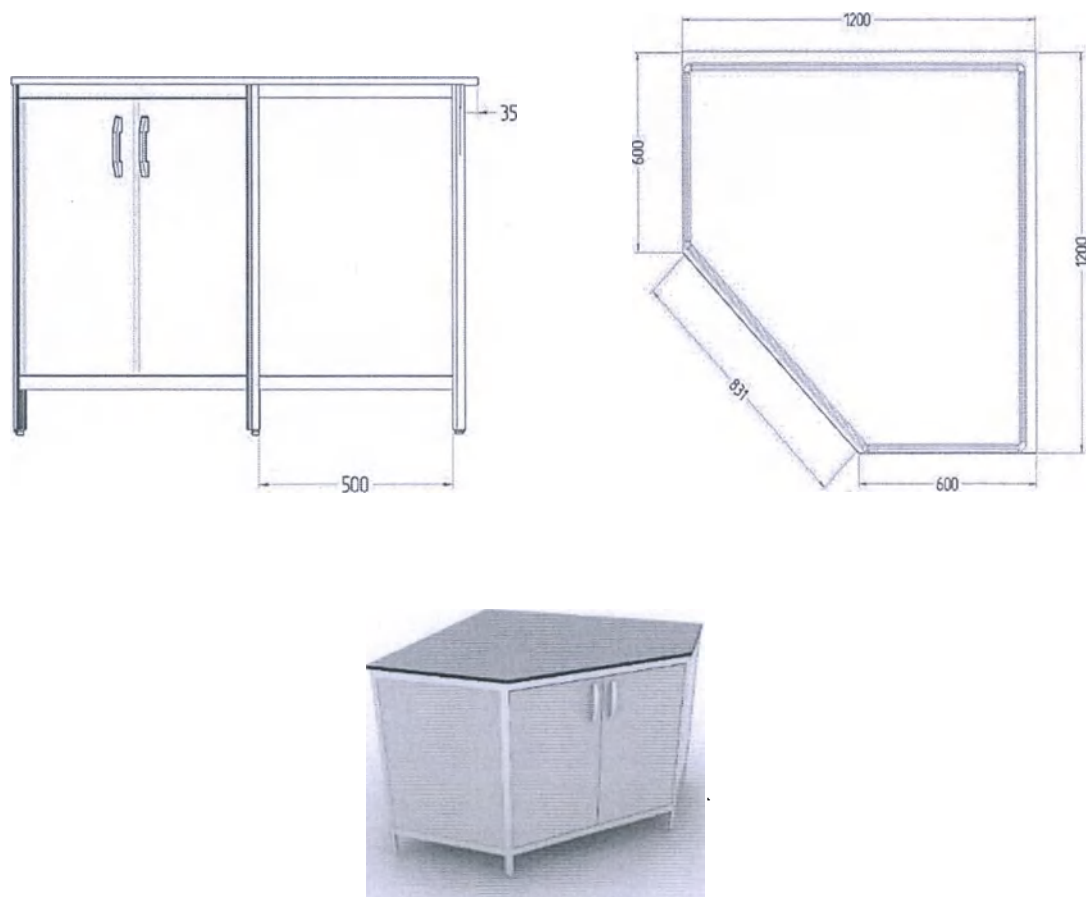


Рисунок 24 - Стол медицинский угловой с двумя дверями (Арт. ШМП-005)

Таблица 24 - Размеры стола медицинского углового с двумя дверями (Арт. ШМП-005)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола
Размеры, мм	1200	1200	930	900

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 29 из 77

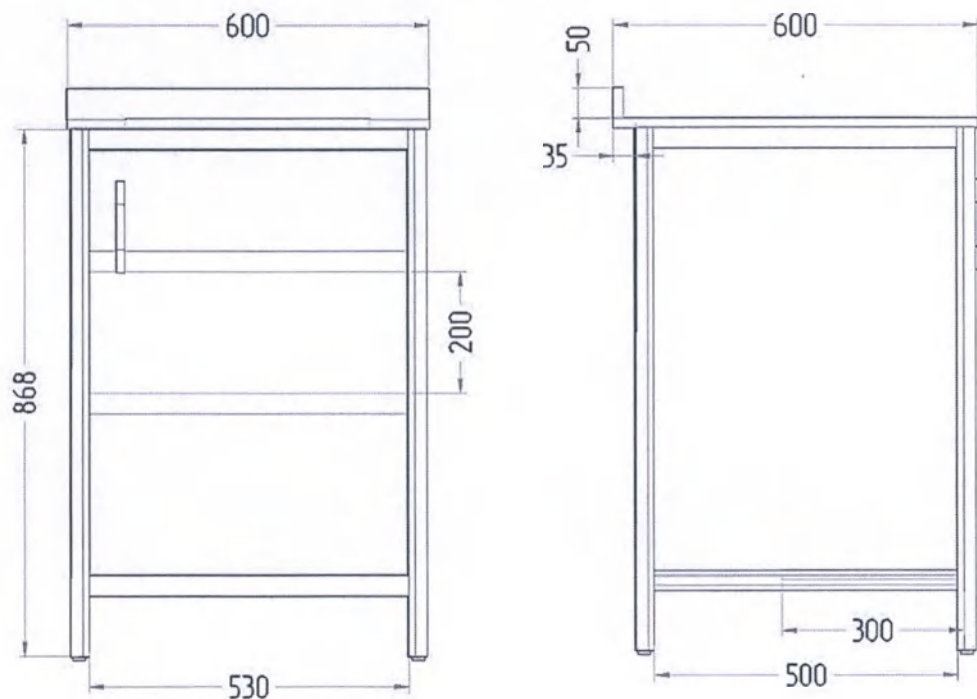


Рисунок 25 - Стол медицинский под мойку с дверцей (Арт. ШМП(М)-006)

Таблица 25 - Размеры стола медицинского под мойку с дверцей (Арт. ШМП(М)-006)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола
Размеры, мм	600	600	980	950

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 30 из 77

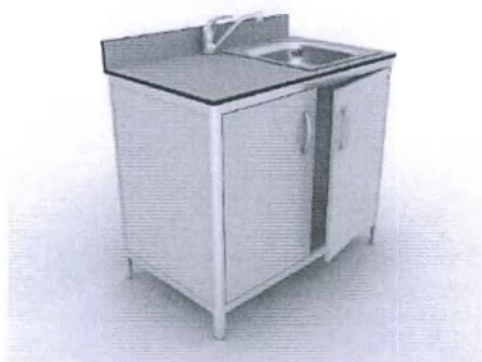
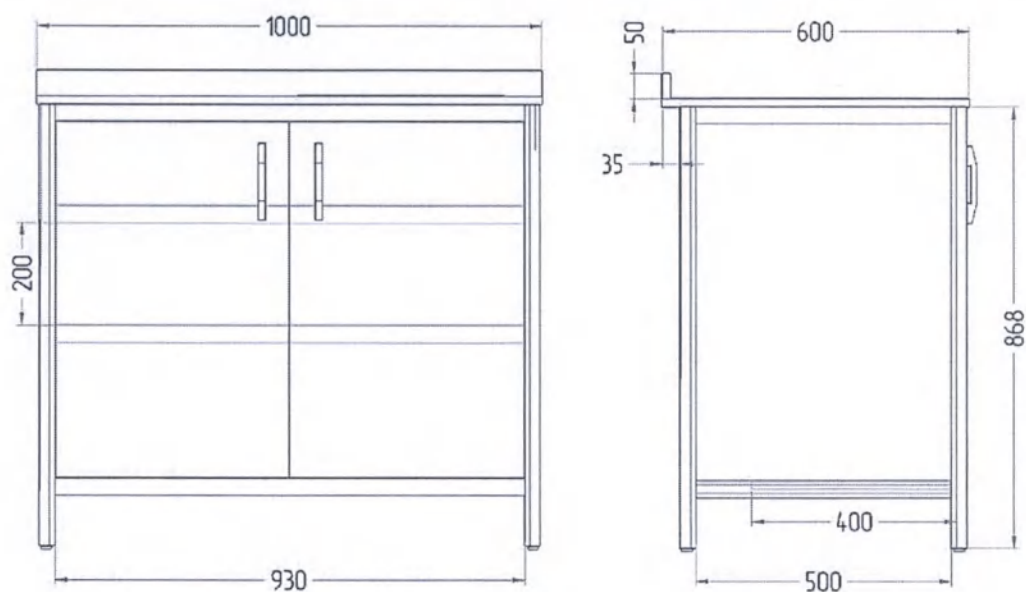


Рисунок 26 - Стол медицинский под мойку двухстворчатый (Арт. ШМП(М)-007)

Таблица 26 - Размеры стола медицинского под мойку двухстворчатый (Арт. ШМП(М)-007)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола
Размеры, мм	1000	600	980	950

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 31 из 77

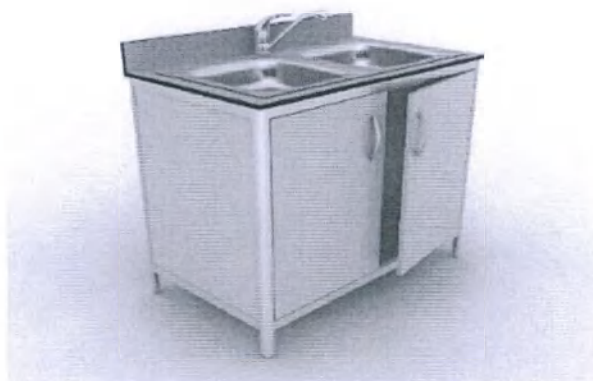
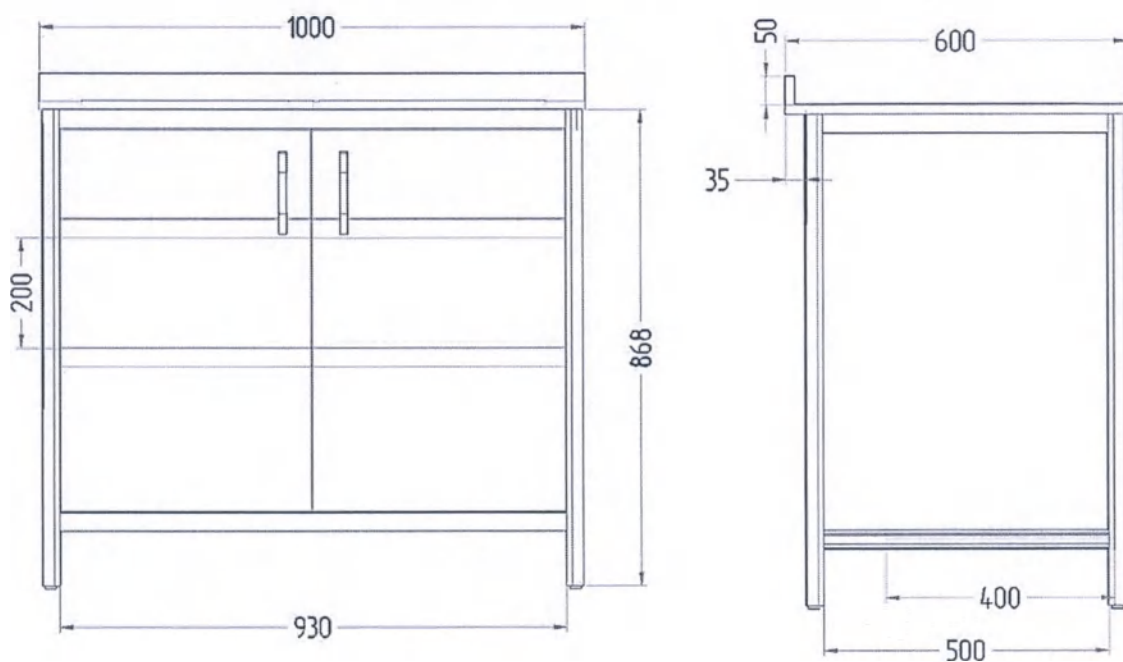


Рисунок 27 - Стол медицинский под двойную мойку (Арт. ШМП(М)-008)

Таблица 27 - Размеры стола медицинского под двойную мойку (Арт. ШМП(М)-008)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола
Размеры, мм	1000	600	980	950

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 32 из 77

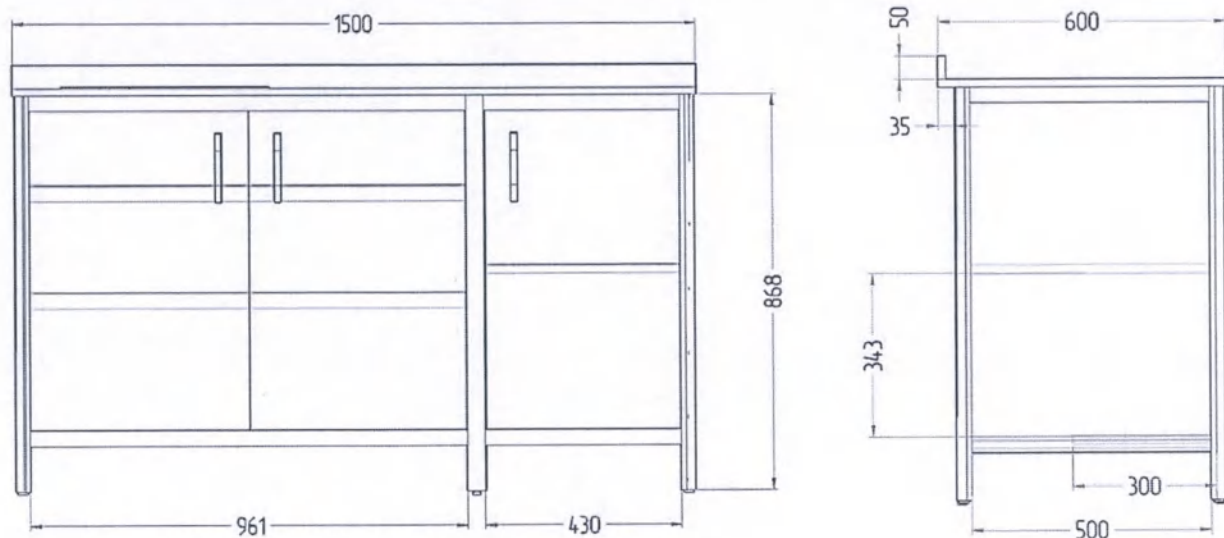


Рисунок 28 - Стол медицинский под мойку с тремя дверями (Арт. ШМП(М)-009)

Таблица 28 - Размеры стола медицинского под мойку с тремя дверями (Арт. ШМП(М)-009)

	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола	Полка 1 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	1500	600	980	950	450	507

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 33 из 77

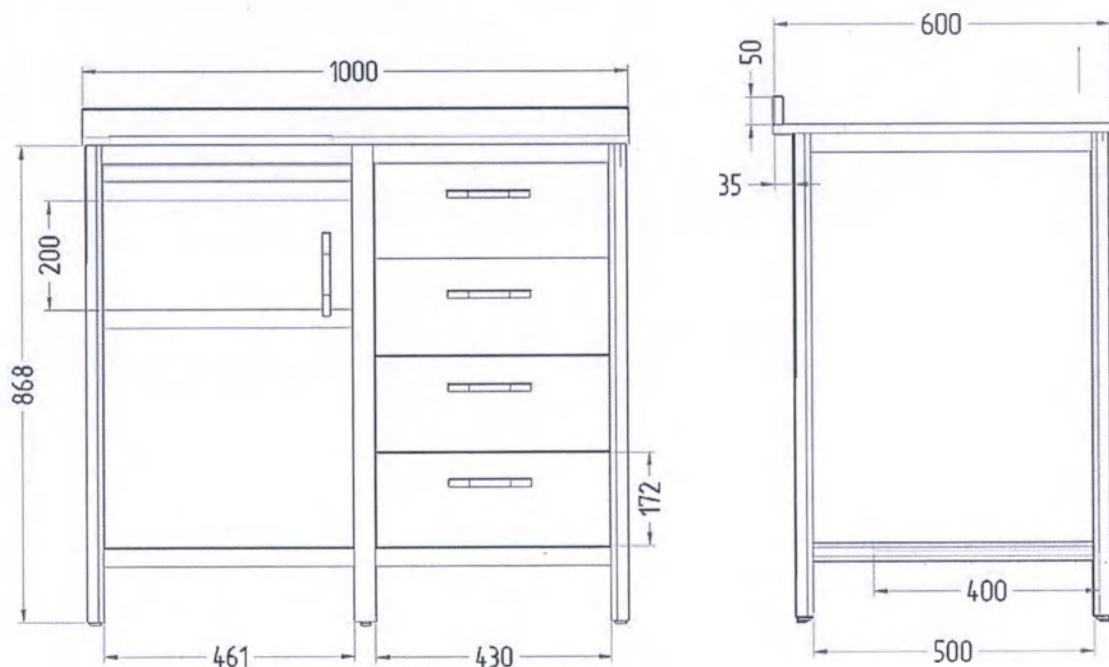


Рисунок 29 - Стол медицинский под мойку с четырьмя ящиками двухсекционный (Арт. ШМП(М)-010)

Таблица 29 - Размеры стола медицинского под мойку с четырьмя ящиками двухсекционный (Арт. ШМП(М)-010)

Размеры, мм	Ширина стола	Глубина стола	Максимальная высота стола	Минимальная высота стола	Ящики 4 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	1000	600	980	950	425	450

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 34 из 77

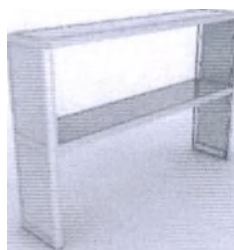
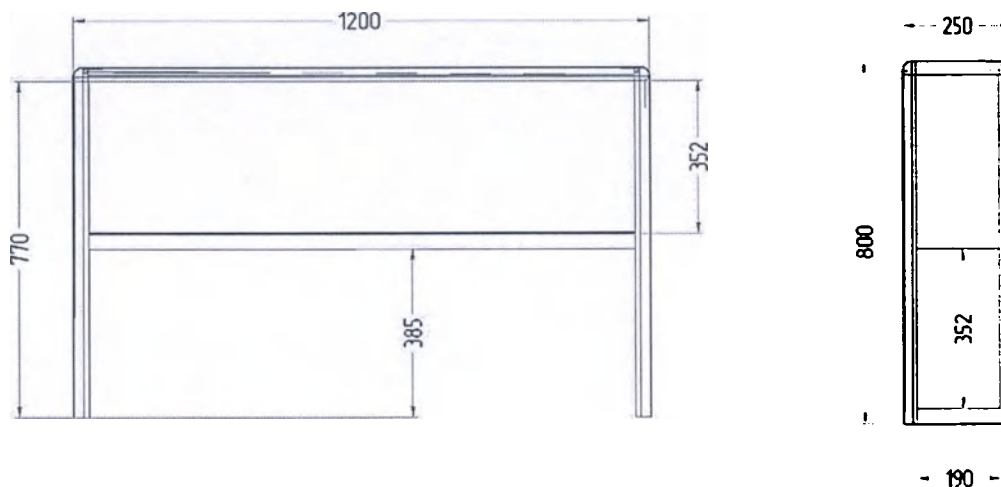


Рисунок 30 - Полка медицинская настольная малая (Арт. ПН-001)



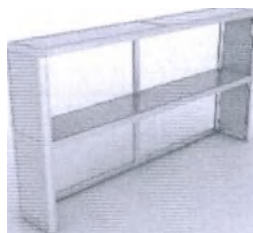


Рисунок 31 - Полка медицинская настольная (Арт. ПН-002)

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И	
	Версия:	1.3
	Страница:	35 из 77

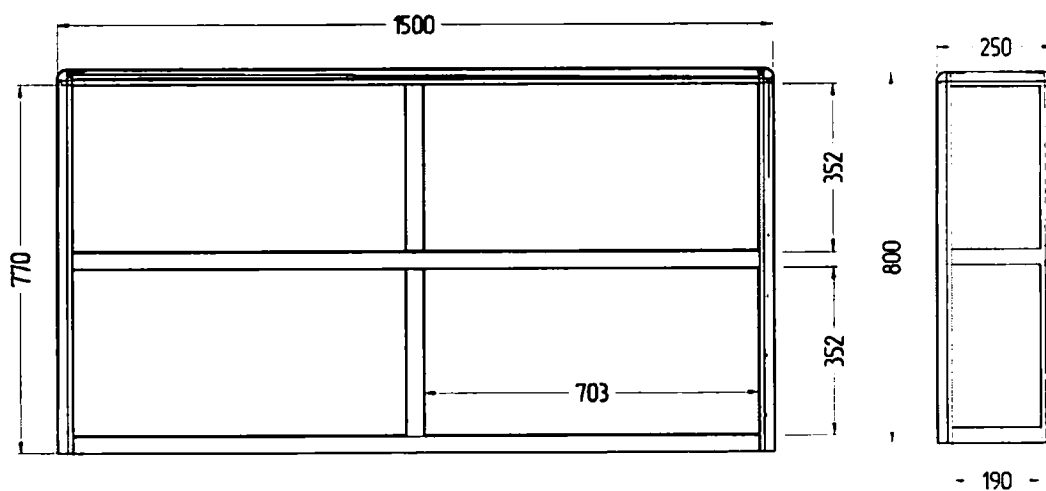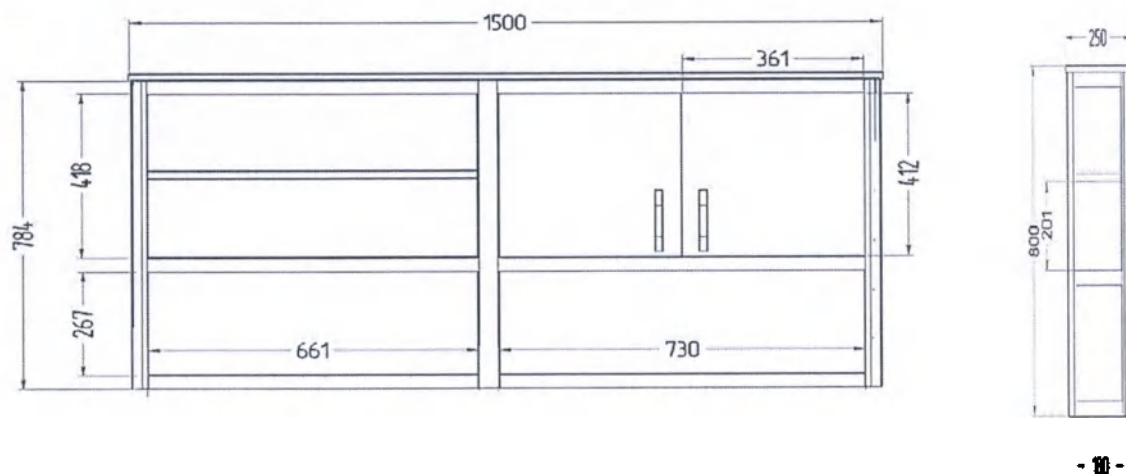

- 30 -



**Рисунок 32 - Полка медицинская настольная двухсекционная с двумя дверями
(Арт. ПН(Д)-003)**

**Таблица 32 – Размеры полки медицинской настольной двухсекционной с двумя дверями
(Арт. ПН(Д)-003)**

Размеры, мм	Ширина полки	Глубина полки	Высота полки	Полка длинная 2 шт.		Полка короткая 2 шт.	
				Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
	1500	250	800	750	190	681	190

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И	
	Версия:	1.3
	Страница:	36 из 77

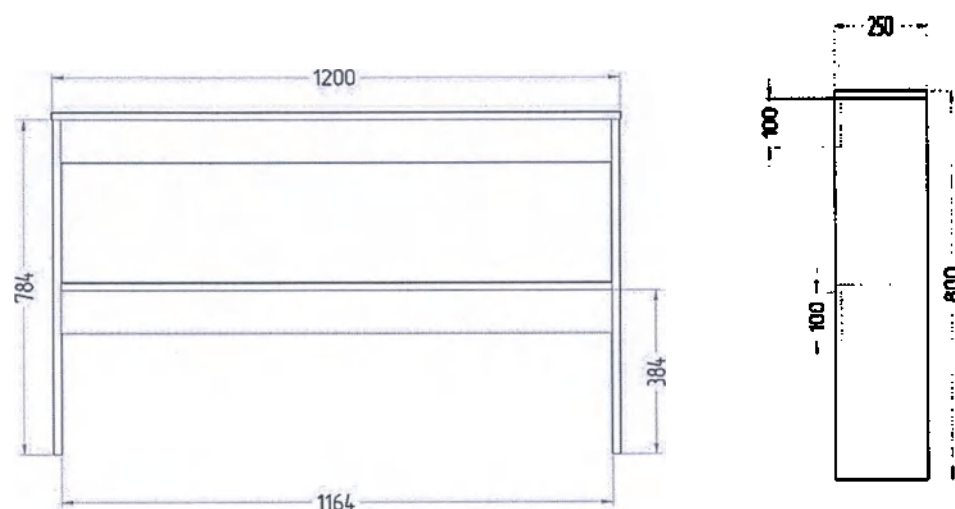


Рисунок 33 - Полка медицинская настольная (Арт. ПН-004)

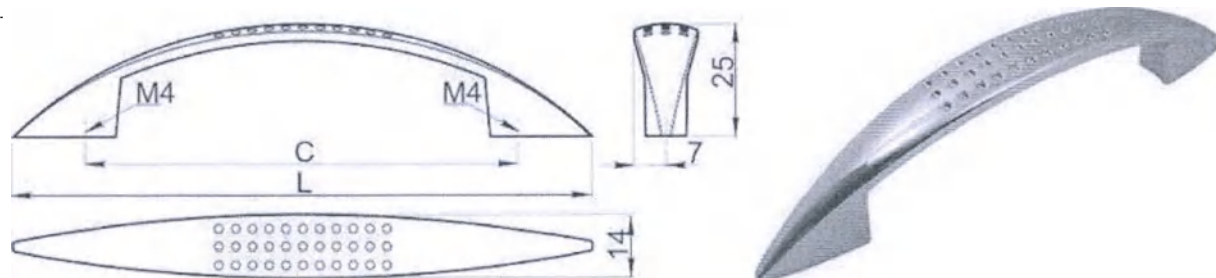


Рисунок 34 – Ручка дверная

Таблица 34 – Размеры ручки дверной

	Общая длина (L)	Длина (C)
Размеры, мм	125	96

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 37 из 77

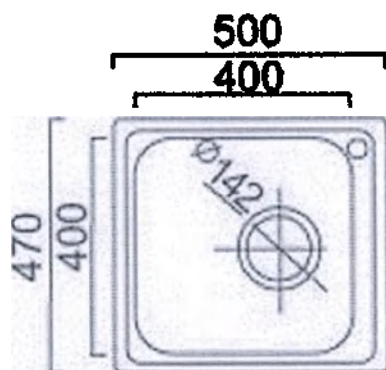


Рисунок 35 – Мойка одинарная для Арт. СО-003, Арт. ШМП(М)-006, Арт. ШМП(М)-007, Арт. ШМП(М)-009, Арт. ШМП(М)-010

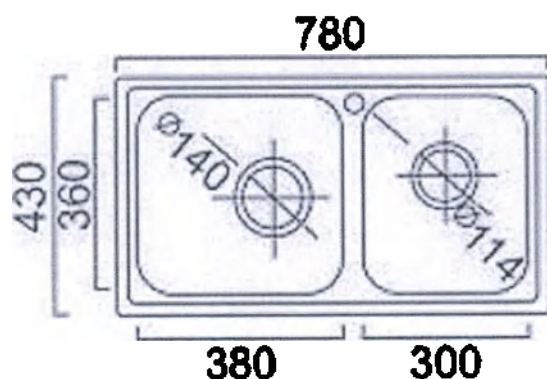


Рисунок 36 – Мойка двойная для стола Арт. ШМП(М)-008

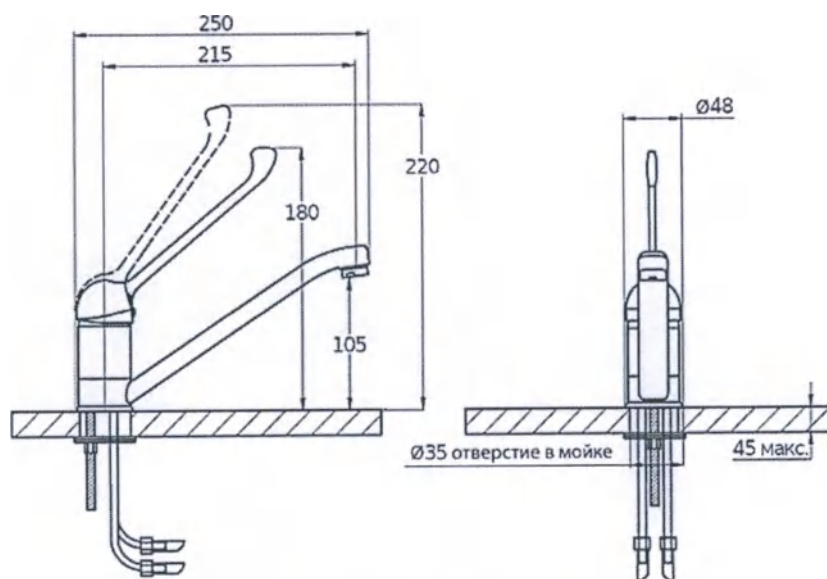


Рисунок 37 – Смеситель

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 38 из 77

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Основные параметры и характеристики

2.1.1 Стол соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ 16371, технических условий и комплекту конструкторской документации ПТИС.324159.001 согласно таблице 41, утвержденной в установленном порядке.

2.1.2 Конструкция и внешний вид соответствуют рисункам 1 – 43 п. 1.6.

Таблица 41- Перечень исполнений стола в полной (ассортиментной) номенклатуре

№	Наименование изделия, его частей	Обозначение документа ПТИС.324159.001	№ Рисунок	Назначение	Размещаемые мед. изделия	Где используется. Специальные медицинские помещения
1.	Стол медицинский однотумбовый с дверью (Арт. СЛ-001)	ПТИС.324159.001-01	Рис. В.1	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.	Перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные, клиничко-диагностические и бактериологические помещения
2.	Стол медицинский однотумбовый с четырьмя выдвижными и ящиками (Арт. СЛ-002)	ПТИС.324159.001-02	Рис. В.2	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинских инструментов.	Перевязочный материал, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные, клиничко-диагностические и бактериологические помещения
3.	Стол медицинский	ПТИС.324159.001-03	Рис. В.3	для использования в	Перевязочный материал,	манипуляционные, процедурные и

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 39 из 77

№	Наименование изделия, его частей	Обозначение документа ПТИС.324159.001	№ Рисунок	Назначение	Размещаемые мед. изделия	Где используется. Специальные медицинские помещения
	й однотумбовый с выдвижным ящиком и дверью (Арт. СЛ-003)			специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.	медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения
4.	Стол медицинский с двумя выдвижными ящиками (Арт. СЛ-004)	ПТИС.324159.001-04	Рис. В.4	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинских инструментов.	Перевязочный материал, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения
5.	Стол медицинский рабочий (Арт. СЛ-005)	ПТИС.324159.001-05	Рис. В.5	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования.	размещение специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 40 из 77

№	Наименование изделия, его частей	Обозначение документа ПТИС.324159.001	№ Рисунок	Назначение	Размещаемые мед. изделия	Где используется. Специальные медицинские помещения
6.	Стол медицинский с перегородкой (Арт. СЛ-006)	ПТИС.324159.001-06	Рис. В.6	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования.	размещение специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения
7.	Стол медицинский двухтумбовый с четырьмя выдвижными ящиками и дверью (Арт. СЛ-007)	ПТИС.324159.001-07	Рис. В.7	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.	Перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения
8.	Стол медицинский двухтумбовый (Арт. СЛ-008)	ПТИС.324159.001-08	Рис. В.8	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской	Перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 41 из 77

№	Наименование изделия, его частей	Обозначение документа ПТИС.324159.001	№ Рисунок	Назначение	Размещаемые мед. изделия	Где используется. Специальные медицинские помещения
				посуды, медицинских инструментов.		
9.	Стол медицинский угловой с усиленной столешницей (Арт. СЛ-009)	ПТИС.32415 9.001-09	Рис. В.9	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования.	размещение специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения
10	Стол медицинский с бортиками (Арт. СЛ-010)	ПТИС.32415 9.001-10	Рис. В.10	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования.	размещение специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения
11	Стол медицинский для работы с микроскопом (Арт. СЛ-011)	ПТИС.32415 9.001-11	Рис. В.11	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования.	размещение специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения
12	Стол медицинский	ПТИС.32415 9.001-19	Рис. В.19	для использования в специальных медицинских	Перевязочный материал, медицинская посуда,	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты,

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 42 из 77

№	Наименование изделия, его частей	Обозначение документа ПТИС.324159.001	№ Рисунок	Назначение	Размещаемые мед. изделия	Где используется. Специальные медицинские помещения
	однотумбовый открытый с выдвижным ящиком (Арт. СЛ-019)			помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.	медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения
13	Стол медицинский однотумбовый с тремя выдвижными ящиками (Арт. СЛ-020)	ПТИС.324159.001-20	Рис. В.20	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинских инструментов.	Перевязочный материал, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения
14	Стол медицинский двухтумбовый с восьмью выдвижными ящиками (Арт. СЛ-021)	ПТИС.324159.001-21	Рис. В.21	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинских инструментов.	Перевязочный материал, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 43 из 77

№	Наименование изделия, его частей	Обозначение документа ПТИС.324159.001	№ Рисунка	Назначение	Размещаемые мед. изделия	Где используется. Специальные медицинские помещения
15	Стол медицинский весовой (Арт. СВ-001)	ПТИС.324159.001-23	Рис. В.23	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования.	размещение специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения
16	Стол медицинский островной на два рабочих места (Арт. СО-001)	ПТИС.324159.001-24	Рис. В.24	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.	Перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения
17	Стол медицинский островной на четыре рабочих места (Арт. СО-002)	ПТИС.324159.001-25	Рис. В.25	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской	Перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 44 из 77

№	Наименование изделия, его частей	Обозначение документа ПТИС.324159.001	№ Рисунок	Назначение	Размещаемые мед. изделия	Где используется. Специальные медицинские помещения
				посуды, медицинских инструментов.		
18	Стол медицинский островной на два рабочих места с двумя мойками (Арт. СО-003)	ПТИС.324159.001-26	Рис. В.26	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.	Перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения
19	Стол медицинский с надстройкой (Арт. СО-004)	ПТИС.324159.001-27	Рис. В.27	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды,	Перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 45 из 77

№	Наименование изделия, его частей	Обозначение документа ПТИС.324159.001	№ Рисунка	Назначение	Размещаемые мед. изделия	Где используется. Специальные медицинские помещения
				медицинских инструментов.		
20	Стол медицинский с двумя дверями (Арт. ШМП-001)	ПТИС.324159.001-29	Рис. В.30	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.	Перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные, клиничко-диагностические и бактериологические помещения
21	Стол медицинский с четырьмя выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. ШМП-002)	ПТИС.324159.001-30	Рис. В.31	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.	Перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные, клиничко-диагностические и бактериологические помещения
22	Стол медицинский с четырьмя выдвижными ящиками и двумя	ПТИС.324159.001-31	Рис. В.32	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и	Перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 46 из 77

№	Наименование изделия, его частей	Обозначение документа ПТИС.324159.001	№ Рисунка	Назначение	Размещаемые мед. изделия	Где используется. Специальные медицинские помещения
	дверями двухсекционный (Арт. ШМП-003)			правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.	оборудования и правильного его функционирования	клинико-диагностические и бактериологические помещения
23	Стол медицинский с тремя дверями двухсекционный (Арт. ШМП-004)	ПТИС.324159.001-32	Рис. В.33	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.	Перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клинико-диагностические и бактериологические помещения
24	Стол медицинский угловой с двумя дверями (Арт. ШМП-005)	ПТИС.324159.001-33	Рис. В.34	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.	Перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клинико-диагностические и бактериологические помещения

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 47 из 77

№	Наименование изделия, его частей	Обозначение документа ПТИС.324159.001	№ Рисунок	Назначение	Размещаемые мед. изделия	Где используется. Специальные медицинские помещения
25	Стол медицинский под мойку с дверцей (Арт. ШМП(М)-006)	ПТИС.324159.001-34	Рис. В.35	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.	Перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения
26	Стол медицинский под мойку двухстворчатый (Арт. ШМП(М)-007)	ПТИС.324159.001-35	Рис. В.36	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.	Перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения
27	Стол медицинский под двойную мойку (Арт. ШМП(М)-008)	ПТИС.324159.001-36	Рис. В.37	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	Перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 48 из 77

№	Наименование изделия, его частей	Обозначение документа ПТИС.324159.001	№ Рисунок	Назначение	Размещаемые мед. изделия	Где используется. Специальные медицинские помещения
				ия, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.	функционирован ия	и бактериологическое помещения
28	Стол медицинский под мойку с тремя дверями (Арт. ШМП(М)-009)	ПТИС.32415 9.001-37	Рис. В.38	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.	Перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологическое помещения
29	Стол медицинский под мойку с четырьмя ящиками двухсекционный (Арт. ШМП(М)-010)	ПТИС.32415 9.001-38	Рис. В.39	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.	Перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологическое помещения
30	Полка медицинская	ПТИС.32415 9.001-39	Рис. В.40	для использования в специальных	Перевязочный материал, медицинская	манипуляционные, процедурные и перевязочные

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 49 из 77

№	Наименование изделия, его частей	Обозначение документа ПТИС.324159.001	№ Рисунок	Назначение	Размещаемые мед. изделия	Где используется. Специальные медицинские помещения
	я настольная малая (Арт. ПН-001)			медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.	посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения
31	Полка медицинская настольная (Арт. ПН-002)	ПТИС.324159.001-40	Рис. В.41	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.	Перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения
32	Полка медицинская настольная двухсекционная с двумя дверями (Арт. ПН(Д)-003)	ПТИС.324159.001-41	Рис. В.42	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного	Перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 50 из 77

№	Наименование изделия, его частей	Обозначение документа ПТИС.324159.001	№ Рисунка	Назначение	Размещаемые мед. изделия	Где используется. Специальные медицинские помещения
				материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.		
33	Полка медицинская настольная (Арт. ПН-004)	ПТИС.324159.001-42	Рис. В.43	для использования в специальных медицинских помещениях, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования, а также для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.	Перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты, для размещения специального медицинского оборудования и правильного его функционирования	манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные, клиничко-диагностические и бактериологические помещения

2.1.3 Габаритные размеры и масса соответствуют значениям, указанным в таблице 42. В столах, кроме Арт. СЛ-014 – Арт. СЛ-018, Арт. СЛ-22, габаритные размеры указаны с регулируемыми опорами во вкрученном состоянии. Предельное отклонение габаритных размеров не превышает ± 4 мм. Дополнительные размеры согласно п. 1.6.

Таблица 42 – Массогабаритные характеристики стола

№	Наименование изделия	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, не менее, кг
–	Стол медицинский однотумбовый с дверью (Арт. СЛ-001)	1200×600×800	54,0
–	Стол медицинский однотумбовый с четырьмя выдвижными ящиками (Арт. СЛ-002)	1200×600×800	65,8
–	Стол медицинский однотумбовый с выдвижным ящиком и дверью (Арт. СЛ-003)	1200×600×800	57,3
–	Стол медицинский с двумя выдвижными ящиками (Арт. СЛ-004)	1200×600×800	53,4
–	Стол медицинский рабочий (Арт. СЛ-005)	1200×600×800	39,4
–	Стол медицинский с перегородкой (Арт. СЛ-006)	1500×600×800	50,9
–	Стол медицинский двухтумбовый с четырьмя выдвижными ящиками и дверью (Арт. СЛ-007)	1500×600×800	85,5

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 51 из 77

№	Наименование изделия	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, не менее, кг
–	Стол медицинский двухтумбовый (Арт. СЛ-008)	1500×600×800	75,7
–	Стол медицинский угловой с усиленной столешницей (Арт. СЛ-009)	1500×1200×800	50,8
–	Стол медицинский с бортиками (Арт. СЛ-010)	800×700×900	33,6
–	Стол медицинский для работы с микроскопом (Арт. СЛ-011)	1000×600×800	32,7
–	Стол медицинский однотумбовый открытый с выдвижным ящиком (Арт. СЛ-019)	1200×600×800	58,1
–	Стол медицинский однотумбовый с тремя выдвижными ящиками (Арт. СЛ-020)	1200×600×800	61,5
–	Стол медицинский двухтумбовый с восьмью выдвижными ящиками (Арт. СЛ-021)	1500×600×800	102,9
–	Стол медицинский весовой (Арт. СВ-001)	500×500×800	39,9
–	Стол медицинский островной на два рабочих места (Арт. СО-001)	1500×1200×1600	184,4
–	Стол медицинский островной на четыре рабочих места (Арт. СО-002)	2700×1200×1600	273,9
–	Стол медицинский островной на два рабочих места с двумя мойками (Арт. СО-003)	2100×1200×1600	271,0
–	Стол медицинский с надстройкой (Арт. СО-004)	1400×700×1100	77,6
–	Стол медицинский с двумя дверями (Арт. ШМП-001)	1000×600×900	58,8
–	Стол медицинский с четырьмя выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. ШМП-002)	1000×600×900	76,9
–	Стол медицинский с четырьмя выдвижными ящиками и двумя дверями двухсекционный (Арт. ШМП-003)	1500×600×900	99,4
–	Стол медицинский с тремя дверями двухсекционный (Арт. ШМП-004)	1500×600×900	86,2
–	Стол медицинский угловой с двумя дверями (Арт. ШМП-005)	1200×1200×900	100,9
–	Стол медицинский под мойку с дверцей (Арт. ШМП(М)-006)	600×600×950	36,7
–	Стол медицинский под мойку двухстворчатый (Арт. ШМП(М)-007)	1000×600×950	49,0
–	Стол медицинский под двойную мойку (Арт. ШМП(М)-008)	1000×600×950	50,0
–	Стол медицинский под мойку с тремя дверями (Арт. ШМП(М)-009)	1500×600×950	76,2
–	Стол медицинский под мойку с четырьмя ящиками двухсекционный (Арт. ШМП(М)-010)	1000×600×950	72,0
–	Полка медицинская настольная малая (Арт. ПН-001)	1200×250×800	13,2
–	Полка медицинская настольная (Арт. ПН-002)	1500×250×800	17,0

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 52 из 77

№	Наименование изделия	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, не менее, кг
–	Полка медицинская настольная двухсекционная с двумя дверями (Арт. ПН(Д)-003)	1500×250×800	41,4
–	Полка медицинская настольная (Арт. ПН-004)	1200×250×800	15,5

2.1.4 Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не превышают значений по ГОСТ 16371.

2.1.5 Покоробленность щитовых деталей стола по ГОСТ 16371.

2.1.6 На видимой поверхности стола отсутствуют дефекты по ГОСТ 20400: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины.

2.1.7 Толщина стенок стола, дверей, столешниц и полок 16 мм. Допускаемое отклонение $\pm 0,5$ мм.

2.1.8 Столешница стола, полки и днища ящиков выдерживают двукратную номинальную равномерно распределенную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой:

- на столешницу стола 30 ± 1 кг;
- на дно ящика 5 ± 1 кг;
- на полку $5 \pm 0,5$ кг;
- на полку настольную 5 ± 1 кг;
- на гранитную плиту 30 ± 1 кг;
- на выдвижную полку $3 \pm 0,5$ кг.

2.1.9 Количество и размеры полок и ящиков, а также их расположение соответствуют требованиям, приведенным в п. 1.6. Предельные отклонения размеров не превышают ± 2 мм.

2.1.10 Дверцы открываются и закрываются плавно, без перекосов, с усилием не более 20 Н.

2.1.11 Петли дверей обеспечивают открывание на 175 ± 2 градусов.

2.1.12 Двери имеют устройство, предотвращающее их самопроизвольное открывание, в виде самопритягивающихся (инерционных) мебельных петель.

2.1.13 Ящики и выдвижные полки стола имеют устройство для предотвращения выпадения их из корпуса.

2.1.14 Ящики и выдвижные полки стола имеют свободный ход без заеданий и перекосов, с усилием выдвижения не более 30 Н.

2.1.15 Стол устойчиво стоит на опорах. Зазор между одной из опор и поверхностью пола не превышает 3 мм.

2.1.16 Изделие устойчиво при приложении нагрузки:

- на выдвинутую полку 35 Н;
- на открытую дверцу 45 Н;
- на выдвинутый ящик 75 Н.

2.1.17 Опоры обеспечивают регулировку по высоте не менее, чем на 30 мм.

2.1.18 Гранитная плита соответствует требованиям:

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 53 из 77

2.1.19 Толщина гранитной плиты весового стола 32 мм. Допускаемое отклонение ± 3 мм.

2.1.20 Предельные отклонения от плоскостности лицевой поверхности гранитной плиты не превышает 0,1 % длины плиты.

2.1.21 Плита полированная с лицевой поверхности и не имеет видимых повреждений: сколов ребер и углов, трещин, каверн, раковин.

2.1.22 На видимой поверхности моек отсутствуют пятна различных оттенков, волнистости и царапины.

2.1.23 Защитные и защитно-декоративные покрытия для поверхностей деталей из металла по ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303 для изделий группы условий 1.

2.1.24 Наружные поверхности устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 (3 % раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % универсального моющего средства типа «Лотос» ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003).

2.1.25 Стол при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов внешней среды в соответствии с требованиями для изделий исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

2.1.26 При транспортировании стол в транспортной таре обладает устойчивостью к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5.

2.1.27 Стол в транспортной таре обладает устойчивостью к воздействию климатических факторов при хранении в крытых помещениях отправителя (получателя) по ГОСТ 16371 при температуре не ниже плюс 2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

2.1.28 Стол в транспортной упаковке обладает устойчивостью к механическим воздействиям при транспортировании соответствующим ГОСТ Р 50444.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 54 из 77

2.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

2.2.1 Материалы, сырье и покупные изделия, применяемые при изготовлении стола, соответствуют требованиям стандартов или технических условий на эти материалы, сырье и покупные изделия, предусмотренные действующим законодательством, и имеют сопроводительные документы о качестве предприятия-поставщика.

2.2.2 Входной контроль сырья, материалов и покупных изделий, применяемых при производстве стола, проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 24297.

2.2.3 Для изготовления стола используется сырье, материалы и покупные изделия согласно таблице 43. Допускается применение материалов другого изготовителя, после прохождения необходимых испытаний, а также при условии неизменности конструктивных и функциональных характеристик, требований безопасности п. 3.1, соответствии материалов требованиям п. 2.2.1, 2.2.2.

Таблица 43 – Сырье и материалы

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
– Стол медицинский однетумбовый с дверью (Арт. СЛ-001); – Стол медицинский двухтумбовый (Арт. СЛ-008)	Каркас, опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки, дверь, полка	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия
	Столешница	Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantentband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Ручка	Пластик бумажно-слоистый декоративный высокого давления (HPL), цвет: серый 478, производства «ABET LAMINATI S.p.A.», Италия
– Стол медицинский однетумбовый с четырьмя выдвижными ящиками (Арт. СЛ-002); – Стол медицинский с двумя выдвижными ящиками (Арт. СЛ-004); – Стол медицинский однетумбовый открытый с выдвижным ящиком (Арт. СЛ-019); – Стол медицинский однетумбовый с тремя	Каркас, опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки, ящики	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 55 из 77

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
выдвижными ящиками (Арт. СЛ-020); – Стол медицинский двухтумбовый с восьмью выдвижными ящиками (Арт. СЛ-021)		Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Столешница	Пластик бумажно-слоистый декоративный высокого давления (HPL), цвет: серый 478, производства «ABET LAMINATI S.p.A.», Италия
	Ручка	Нержавеющая сталь марки 08X18H10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
– Стол медицинский одностумбовый с выдвижным ящиком и дверью (Арт. СЛ-003); – Стол медицинский двухтумбовый с четырьмя выдвижными ящиками и дверью (Арт. СЛ-007)	Каркас, опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АДЗ1(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки, дверь, полка, ящик	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия
		Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Столешница	Пластик бумажно-слоистый декоративный высокого давления (HPL), цвет: серый 478, производства «ABET LAMINATI S.p.A.», Италия
	Ручка	Нержавеющая сталь марки 08X18H10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
– Стол медицинский рабочий (Арт. СЛ-005); – Стол медицинский с перегородкой (Арт. СЛ-006); – Стол медицинский угловой с усиленной столешницей (Арт. СЛ-009); – Стол медицинский для работы с микроскопом (Арт. СЛ-011)	Каркас, опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АДЗ1(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия
		Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Столешница	Пластик бумажно-слоистый декоративный высокого давления (HPL), цвет: серый 478, производства «ABET LAMINATI S.p.A.», Италия
– Стол медицинский с бортиками (Арт. СЛ-010)	Каркас, опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АДЗ1(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 56 из 77

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
– Стол медицинский весовой (Арт. СВ-001)	Стенки, столешница, бортики	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Каркас, опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Столешница	Гранитная плита 30 мм полированная, производства ОАО «Уральские камни», Россия
– Стол медицинский островной на два рабочих места (Арт. СО-001); – Стол медицинский островной на четыре рабочих места (Арт. СО-002)	Каркас, опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки, полки, ящики, дверь	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Столешница	Пластик бумажно-слоистый декоративный высокого давления (HPL), цвет: серый 478, производства «ABET LAMINATI S.p.A.», Италия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 57 из 77

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
– Стол медицинский островной на два рабочих места с двумя мойками (Арт. СО-003)	Надставка	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Каркас, опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки, полки, ящики, дверь	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Столешница	Пластик бумажно-слоистый декоративный высокого давления (HPL), цвет: серый 478, производства «ABET LAMINATI S.p.A.», Италия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
	Мойки	Модель 719 одинарная из нержавеющей стали марки 08Х18Н10 (ГОСТ Р 50851), производства Foshan Sanshui Rongying Kitchen Hygiene Co., Ltd., Китай
	Смеситель	Смеситель локтевой, нержавеющая сталь 20Х13 по ГОСТ 5632 покрытая хромом Х99 ГОСТ 5905, производства ООО «Альфа», Россия
	Надставка	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 58 из 77

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
– Стол медицинский с надстройкой (Арт. СО-004)		Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Каркас, опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки, полка, ящик, дверь, столешница	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
	Надставка	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
– Стол медицинский с двумя дверями (Арт. ШМП-001);	Каркас, опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 59 из 77

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
– Стол медицинский с тремя дверями двухсекционный (Арт. ШМП-004); – Стол медицинский угловой с двумя дверями (Арт. ШМП-005)	Стенки, двери, полка	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Столешница, бортик	Пластик бумажно-слоистый декоративный высокого давления (HPL), цвет: серый 478, производства «АВЕТ LAMINATI S.p.A.», Италия
	Ручка	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
– Стол медицинский с четырьмя выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. ШМП-002); – Стол медицинский с четырьмя выдвижными ящиками и двумя дверями двухсекционный (Арт. ШМП-003)	Каркас, опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки, двери, ящики, полка	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Столешница, бортик	Пластик бумажно-слоистый декоративный высокого давления (HPL), цвет: серый 478, производства «АВЕТ LAMINATI S.p.A.», Италия
	Ручка	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
– Стол медицинский под мойку с дверцей (Арт. ШМП(М)-006); – Стол медицинский под мойку двухстворчатый (Арт. ШМП(М)-007); – Стол медицинский под мойку с тремя дверями (Арт. ШМП(М)-009)	Каркас, опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки, полки, двери	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 60 из 77

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
		Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Столешница, бортик	Пластик бумажно-слоистый декоративный высокого давления (HPL), цвет: серый 478, производства «ABET LAMINATI S.p.A.», Италия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08X18H10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
	Мойка	Модель 719 одинарная из нержавеющей стали марки 08X18H10 (ГОСТ Р 50851), производства Foshan Sanshui Rongying Kitchen Hygiene Co., Ltd., Китай
	Смеситель	Смеситель локтевой, нержавеющая сталь 20X13 по ГОСТ 5632 покрытая хромом Х99 ГОСТ 5905, производства ООО «Альфа», Россия
– Стол медицинский под двойную мойку (Арт. ШМП(М)-008)	Каркас, опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки, полки, двери	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия
		или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия
		Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Столешница, бортик	Пластик бумажно-слоистый декоративный высокого давления (HPL), цвет: серый 478, производства «ABET LAMINATI S.p.A.», Италия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08X18H10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
	Мойка	Модель 729 двойная из нержавеющей стали марки 08X18H10 (ГОСТ Р 50851), производства Foshan Sanshui Rongying Kitchen Hygiene Co., Ltd., Китай
– Стол медицинский под мойку с четырьмя	Смеситель	Смеситель локтевой, нержавеющая сталь 20X13 по ГОСТ 5632 покрытая хромом Х99 ГОСТ 5905, производства ООО «Альфа», Россия
	Каркас, опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 61 из 77

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
ящиками двухсекционный (Арт. ШМП(М)-010)	Стенки, полки, двери, ящики	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Столешница, бортик	Пластик бумажно-слоистый декоративный высокого давления (HPL), цвет: серый 478, производства «ABET LAMINATI S.p.A.», Италия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
	Мойка	Модель 719 одинарная из нержавеющей стали марки 08Х18Н10 (ГОСТ Р 50851), производства Foshan Sanshui Rongying Kitchen Hygiene Co., Ltd., Китай
	Смеситель	Смеситель локтевой, нержавеющая сталь 20Х13 по ГОСТ 5632 покрытая хромом Х99 ГОСТ 5905, производства ООО «Альфа», Россия
– Полка медицинская настольная малая (Арт. ПН-001); – Полка медицинская настольная (Арт. ПН-002)	Каркас	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки, полки	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия

2.3 Требования к надежности

2.3.1 Средняя наработка на отказ (То) 10000 часов. Критериями отказа является несоответствие требованиям п.п. 2.1.5, 2.1.6, 2.1.10 – 2.1.17.

2.3.2 Средний срок службы стола 4 года. Критерием предельного состояния стола считается невозможность или нецелесообразность его восстановления (или использования).

2.4 Комплектность

2.4.1 Комплект поставки должен включать в себя:

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 62 из 77

№	Наименование	Кол-во, шт.
I.	Стол одного из исполнений, в сборе	1
II.	Принадлежности	
–	Полка одного из исполнений, в сборе	*
III.	Эксплуатационная документация:	
–	Инструкция по применению ПТИС.324159.001 И	1

Примечание: количество и исполнение стола определяются при заказе по согласованию с заказчиком.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 63 из 77

2.5 Маркировка

2.5.1 Маркировка стола соответствует ГОСТ 16371, ГОСТ Р 50444 и ГОСТ Р ИСО 15223-1.

2.5.2 На каждом изделии этикетка, на которой указано:

- наименование и местонахождение предприятия-изготовителя ;
- наименование изделия, его исполнение;
- обозначение изделия (артикул);
- наименование страны-изготовителя;
- дата изготовления: месяц и год ;
- гарантийный срок эксплуатации;
- срок службы;
- заводской номер ;
- обозначение технических условий, ГОСТ 16371.

ООО «ВИТА»	
 Юридический адрес: 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206	ГОСТ 16371-2014 ТУ 32.50.30-003-48837523-2019 Изготовлено в Российской Федерации
Стол медицинский (Артикул) по ТУ 32.50.30-003-48837523-2019	
Дата изготовления:  .20	Порядок применения, гарантия изготовителя: см. Инструкцию по применению ПТИС.324159.001 И
Заводской номер:  XXXXXX	
Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца	
Срок службы: 4 года	
Транспортировать при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 100%. Хранить в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.	

Рисунок 48 – Шаблон маркировки стола

2.5.3 Транспортная маркировка должна быть по ГОСТ 14192.

Транспортная маркировка должна быть нанесена на бумажные или картонные ярлыки, или непосредственно на тару, ярлыки прикрепляют к упаковке клеем или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.

На каждую транспортную тару должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям:

«Хрупкое. Осторожно» 

«Беречь от влаги» 

«Верх» 

Допускаются иные информационные знаки и надписи.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 64 из 77

2.6 Упаковка

2.6.1 Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ 16371 и конструкторской документации.

2.6.2 Эксплуатационная документация должна быть помещена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и уложена в упаковку.

2.6.3 Допускаются иные способы упаковки, обеспечивающие защиту стола от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование вместимости транспортных средств и удобство выполнения разгрузочно-погрузочных работ.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 65 из 77

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 По санитарно-химическим, токсикологическим и биологическим показателям стол соответствует требованиям ГОСТ Р 52770, стандартов серии ГОСТ ISO 10993, а также нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

3.2 Уровни летучих химических веществ, выделяющихся при эксплуатации стола в воздух помещений, соответствуют ГОСТ 16371, и не превышают допустимый уровень, а именно: аммиака – не более 0,04 мг/м³; спирта метилового – не более 0,5 мг/м³; формальдегида – не более 0,01 мг/м³; фенола – 0,003 мг/м³. Класс эмиссии формальдегида древесно-стружечных плит – E1.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 66 из 77

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1 Эксплуатационные ограничения

 Каждое изделие проходит перед продажей специальную проверку изготовителем. Тем не менее, при транспортировке могут произойти непредвиденные повреждения, не связанные с производством стола.

Пожалуйста, проведите визуальную оценку упаковки, состояния комплектующих стола, чтобы убедиться в отсутствии различных вмятин, сколов, порезов и повреждений от ударов. Если Вы обнаружите повреждения, обратитесь к Изготовителю.

Рабочие условия окружающей среды:

Температура от плюс 10 до плюс 35 °С.

Относительная влажность воздуха: до 80 %.

4.2 Подготовка к эксплуатации

При использовании изделия впервые после его приобретения проверьте соответствие комплектности по разделу 2.4 настоящей инструкции по применению.

Использование изделия не требует специального обучения и может быть выполнено силами пользователя.

Освободите стол от упаковки, выбросьте упаковочный материал.

Установите стол на ровной гладкой поверхности, при необходимости, отрегулируйте опоры стола по высоте. Стол должен стоять ровно и устойчиво.

При заказе стола с принадлежностями, в виде полки настольной, пользователю необходимо самостоятельно зафиксировать полку на рабочей поверхности стола. После установки полки настольной в соответствии с требованиями п. 4.2.1, стол готов к эксплуатации.

4.2.1 Установка полки настольной

 Полка настольная должна устанавливаться только на столы, столешница которых соответствует длине полки.

Распакуйте полку настольную, выбросьте упаковочный материал.

Полка настольная имеет средства крепления в виде металлических уголков. Крепеж не входит в комплект поставки. Сверлом просверливаем отверстия в столешнице и саморезами фиксируем уголки.

Полка должна быть закреплена прочно, неподвижно, плотно прилегая к столешнице стола.

4.3 Порядок работы с изделием

 Перед первым использованием рекомендуется осуществить дезинфекцию в соответствии с требованиями раздела 5.

Используйте стол в соответствии с его функциональным назначением.

Примечание: Следует учитывать информацию по рекомендуемой нагрузке (п.п. 2.1.8, 2.1.16).

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 67 из 77

5 УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

5.1 Техническое обслуживание

При эксплуатации стол не требуют технического обслуживания. Тем не менее, необходимо регулярно контролировать отсутствие механических повреждений частей стола при внешнем осмотре.

Так же необходимо обеспечивать очистку и дезинфекцию стола.

5.2 Уход и дезинфекция

Ежедневно необходимо обеспечивать влажную уборку - 3 раза в день, из них - 2 раза с использованием моющего средства, третий раз - с применением дезинфицирующего средства.

Внешние и внутренние доступные поверхности стола протрите салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе или моющим средством, затем протрите насухо мягкой тканью. В качестве дезинфицирующего раствора рекомендуется использовать 3 % раствор перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644, 1 % раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003 или иными средствами согласно МУ 287-113.

 Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы, не предназначенные для ухода за столом.

 Не следует ставить на поверхность стола и полки горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 68 из 77

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Использование стола должно осуществляться в соответствии с настоящей инструкцией по применению ПТИС.324159.001 И.

6.2 К эксплуатации стола допускается медицинский персонал и пациенты, детально изучившие инструкцию по применению.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортирование стола должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

Транспортирование стола может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны проводиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

При транспортировании самолетом – в отапливаемом герметизированном отсеке.

7.2 Условия транспортирования стола должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 100 % при температуре плюс 25 °С.

7.3 Условия хранения стола должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 16371: в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже плюс 2 °С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70 %.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 69 из 77

8 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1 Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.7.2790.

8.2 Согласно СанПиН 2.1.7.2790 стол относится к медицинским отходам класса А – эпидемиологически безопасные отходы.

8.3 Перед утилизацией стол должен быть подвергнут санитарной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113.

8.4 Стол должен подлежать утилизации в случае:

- окончания срока эксплуатации;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью пользователя и свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

8.5 Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 70 из 77

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Стол медицинский производства ООО «ВИТА»

Исполнение _____

Артикул _____ Заводской номер _____

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 71 из 77

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стол медицинский

Исполнение _____

Артикул _____ Заводской номер _____

упакован на предприятии-изготовителе ООО «ВИТА» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____
 (личная подпись) (расшифровка подписи) (дата)

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 72 из 77

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии в адрес изготовителя представляют при несоответствии поставляемого изделия, его тары, упаковки, маркировки и комплектности требованиям сопроводительной документации.

Все предъявленные рекламации должны регистрироваться заводом-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в десятидневный срок.

О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

Для определения причин повреждений необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

- наименование, артикул и заводской номер изделия;
- дата получения изделия с завода-изготовителя и номер документа, по которому оно получено;
- детальное описание повреждения;
- предполагаемая причина повреждения;
- наименование поврежденных частей и т.д.

Предприятие-изготовитель принимает рекламацию, если не установлена вина получателя в возникновении дефекта в изделии.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 73 из 77

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества стола требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи предприятием-изготовителем.

12.3 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Уважаемые покупатели!

При покупке убедитесь в том, что продавец полностью заполнил гарантийный талон и поставил печать.

Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

В случае, если изделие не соответствует требованиям технических условий в гарантийный период, обратитесь к продавцу.

Гарантийный срок эксплуатации изделия указан в настоящей инструкции и исчисляется с даты продажи. При обнаружении несоответствия изделия требованиям технических условий покупателю гарантируется бесплатный ремонт или обмен на аналогичный товар надлежащего качества.

Производитель оставляет за собой право отказа по гарантийному обязательству в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

- Гарантия действует только при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием, даты продажи, четкой печатью фирмы-продавца.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- если гарантийный талон не предоставлен или информация в нем не полная, неразборчивая или содержит исправления;
- несовпадения заводского номера изделия с гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений;
- несоблюдения правил эксплуатации изделия и т.д.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 74 из 77

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
на замену в течение гарантийного срока

Стол медицинский производства ООО «ВИТА»

Исполнение _____

Артикул _____ Заводской номер _____

Приобретен _____

(дата, подпись и штамп покупателя)

Продавец

(подпись, печать)

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324159.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 75 из 77

ПРИЛОЖЕНИЕ А.
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение документа, на который дана ссылка	Наименование документа
-	Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации № 4н от 06.06.2012 «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»
ГОСТ 2.106-96	Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Текстовые документы
ГОСТ 2.601-2013	Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы
ГОСТ 2.610-2006	Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов
ГОСТ 9.032-74	ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.
ГОСТ 9.301-86	ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования.
ГОСТ 9.303-84	Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия.
ГОСТ 5632-2014	Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки
ГОСТ 5905-2004	Хром металлический. Технические требования и условия поставки
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16371-2014	Мебель. Общие технические условия
ГОСТ 20400-2013	Продукция мебельного производства. Термины и определения
ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 32289-2013	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 37 лист(ов)

Генеральный директор
ООО «Витас»

Чайус Н.Н.

«20» сентября 2022г

