




Фото 1. Набор реагентов «ДИПЛЕКС Мh+Us» вариант исполнения ДИПЛЕКС Мh+Us -PB-120

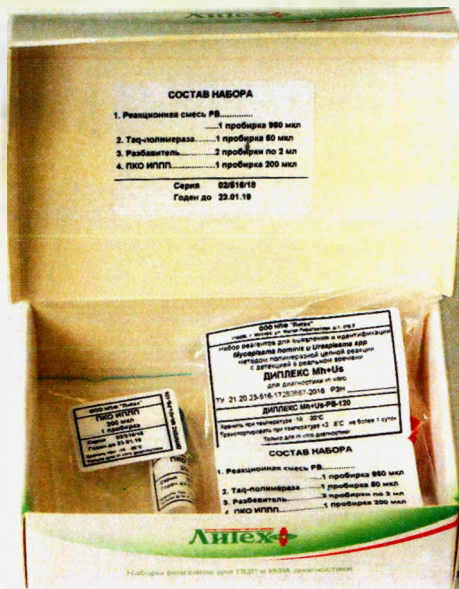

Вкладыш
к набору ДИПЛЕКС Mh+Us

Номер серии набора 0281618 Дата изготовления 23.01.18 Годен до 23.01.19
 Номер серии ПКО ИППП 01/18 Дата изготовления 23.01.18 Годен до 23.01.19

Литех ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 0281618
 Набор реагентов для выявления и идентификации
 возбудителя болезни и возбудителя при
 методе полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени
 «ДИПЛЕКС Mh+Us»
 для диагностики по чипу
 по ТУ 21 20 23-516-1723347-2018
ДИПЛЕКС Mh+Us-PB-120

Предприятие-изготовитель ООО ИПФ «Литех», Москва 119415, ул. Малая Пироговская 1 стр. 3 тел. (499) 218-79-47

Номер серии 0281618 Дата изготовления 23.01.18 Наборная серия 81

Состав компонента	Компонент	Примечание
Реакционная смесь РВ	1 пробирка 880 мкл	Прозрачная бесцветная жидкость
Таб-полимераза	1 пробирка 60 мкл	Прозрачная бесцветная жидкость
Разбавитель	3 пробирки по 2 мл	Прозрачная бесцветная жидкость
ПКО ИППП	1 пробирка 300 мкл	Прозрачная бесцветная жидкость

Условия хранения	Характеристики и нормы
Наименование индикатора	1. Интенсивность
1. Интенсивность	1. Интенсивность

ПАМЯТКА
 для выявления и идентификации
 возбудителя болезни и возбудителя при
 методе полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени
 «ДИПЛЕКС Mh+Us»
 для диагностики in situ

1. Подготовка к проведению амплификации, вариант исполнения «Неавтоматизированный»
 1.1. Приготовить необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, из которых пробирки для положительного и отрицательного контроля.
 Маркировка пробирки на ярлыке возможна только для реальных амплификаторов Ролли Селла, для всех остальных амплификаторов маркировка пробирки на ярлыке невозможна! В таких случаях пробирки следует маркировать в соответствии с соответствием к зрению подготовленной смеси.
 1.2. Полностью разокорать компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.
 1.3. Из компонентов набора приготовить смесь из расчета на 1 образец.

Компонент	Количество (мкл)
Разбавитель	21
Реакционная смесь	7
Таб-полимераза	0,3

Рекомендуется готовить смесь реагентов не менее чем за 5 минут. При приготовлении смеси необходимо все компоненты добавлять отдельно.
 1.4. Перемешать амплификационную смесь пипетированием или вращением.
 1.5. Внести в приготовленную пробирку по 28 мкл полученной амплификационной смеси.
 Перейти к пункту 4.
 2. Подготовка к проведению амплификации, варианты исполнения «TwoStep PB-60», «TwoStep PB-95»






Фото 5. Набор реагентов «ДИПЛЕКС Mh+Us» вариант исполнения ДИПЛЕКС Mh+Us-OneStep-PB-60. Комплектность набора.



Фото 6. Набор реагентов «ДИПЛЕКС Mh+Us» вариант исполнения ДИПЛЕКС Mh+Us-OneStep-PB-60. Компоненты набора.



Фото 7. Набор реагентов «ДИПЛЕКС Мh+Us» вариант исполнения ДИПЛЕКС Мh+Us-OneStep-PB-96.

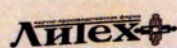

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 06/05-516/18
Набор реагентов для выявления и идентификации
Mycoplasma hominis и *Ureaplasma spp.*
методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени
«ДИПЛЕКС Мh+Us»
для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-516-17253567-2018

ДИПЛЕКС Мh+Us-OneStep-PB-96

Предприятие-изготовитель ООО НПФ «Литех», Москва 119435, ул. Малая Пироговская 1
39-47

Номер серии 06/05-516/18 Дата изготовления 23.01.18 Наборов

Состав комплекта	Состав	Комплектация	Внешний вид
Амплификационная смесь PB-OS	96 пробирок по 28 мкл	Прозрачная бесцветная вязкая прозрачная жид.	
Разбавитель	1 пробирка - 1 мл		
ПКО ИППП			

Вкладыш
к набору ДИПЛЕКС Мh+Us

Номер серии набора 06/05-516/18 Дата изготовления 23.01.18 Годен до 23.05.18
Номер серии ПКО ИППП 06/18 Дата изготовления 15.01.18 Годен до 15.01.20

ПКО ИППП представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов, содержащих фрагменты ДНК *Mycoplasma hominis*, человека и общий фрагмент ДНК *Ureaplasma parvum* и *Ureaplasma urealyticum* (*Ureaplasma spp.*).

Наименование калибратора	Концентрация (г/мл)	Допустимый диапазон Ct
<i>Mycoplasma hominis</i>	25.6	23.7-27.7
<i>Ureaplasma spp.</i>	24.9	23.1-27.3
ДНК человека	23.8	22.1-26.1

СОСТАВ НАБОРА

1. Амплификационная смесь PB-OS 96 пробирок по 28 мкл
2. ПКО ИППП 1 пробирка 100 мкл
3. Разбавитель 1 пробирка 1 мл

Серия 02105-516/18
Годен до 23.05.18



ПАМЯТКА

набор реагентов для выявления и идентификации
Ureaplasma hominis и *Ureaplasma spp.*
с целью реакции с детекцией в реальном времени
«ДИПЛЕКС Мh+Us»
для диагностики in vitro

вариант исполнения

- 1.1. Приготовить необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контроля.
- 1.2. Маркировка пробирок на крышке возможна только для реал-тайм пробирок на крышке недопустима! В таком случае пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.
- 1.3. Полностью разморозить компоненты с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.
- 1.4. Из компонентов набора приготовить смесь из расчета на 1 образец.

Компонент	Количество (мкл)
Разбавитель	21
Реакционная смесь	7
Taq-полимераза	0.3

- 1.4. Рекомендуется готовить смесь реагентов не менее чем на 5 реакций. При подготовке смеси необходимо все компоненты добавлять отдельно.
- 1.5. Перемешать амплификационную смесь пипетированием или импульсным встряхиванием в течение 10 секунд.
- 1.6. Внести в подготовленные пробирки по 28 мкл полученной амплификационной смеси.
- Перейти к пункту 4.

2. Подготовка к проведению амплификации, варианты исполнения «OneStep» PB-60, «TwoStep» PB-96





www.lytech.ru • (495) 258-39-47



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 01/70-516/18
Набор реактивов для выявления и идентификации
Mycobacterium hominis и *Mycobacterium abscessus*
методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени
«ДИПЛЕКС Mh+Us»

для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-516-17253567-201

ДИПЛЕКС Mh+Us-TwoStep-PB-60

Предприятие-изготовитель ООО НПФ «Литех», Москва 119435, ул. Малая Пироговская 1

39-47

Номер серии 01/70-516/18 Дата изготовления 15.01.18 Наборов в серии 32

Состав комплектации:

Состав	Комплектация	Внешний вид
1. Реакционная смесь РВ-ТБ	60 пробирок по 21 мкл	
2. ПКО ИППП	1 пробирка 100 мкл	
3. Разбавитель	1 пробирка 1 мл	
4. Раствор Taq-полимеразы	1 пробирка 800 мкл	

Вкладыш
к набору ДИПЛЕКС Mh+Us

Номер серии набора 01/70-516/18 Дата изготовления 15.01.18 Годен до 15.01.19
Номер серии ПКО ИППП 01/18 Дата изготовления 15.01.18 Годен до 15.01.19

ПКО ИППП представляет собой количественно-оценочную смесь калибраторов, содержащих фрагменты ДНК *Mycobacterium hominis*, *Mycobacterium abscessus* и общий фрагмент ДНК *Mycobacterium tuberculosis* (*Mycobacterium tuberculosis* spp.).

Наименование калибратора	Концентрация (10 ⁴ коп/мл)	Диагностическая область (С)
<i>Mycobacterium hominis</i>	25.8	21.1-21.7
<i>Mycobacterium abscessus</i>	24.9	21.1-21.3
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	23.8	22.1-28.1

СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционная смесь РВ-ТБ 60 пробирок по 21 мкл
2. ПКО ИППП 1 пробирка 100 мкл
3. Разбавитель 1 пробирка 1 мл
4. Раствор Taq-полимеразы 1 пробирка 800 мкл

Серия: 01/70-516/18

Годен до: 15.01.19



Набор реактивов для ПЦР in vitro диагностики

ПАМЯТКА
агентов для выявления и идентификации
M. hominis и *M. abscessus* spp.
в реакциях с детекцией в реальном времени
ДИПЛЕКС Mh+Us
и диагностики in vitro
методом амплификации.

- 1.1 Приготовить необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контроля образцов.
- Маркировка пробирок на крышке возможна только для реал-тайм амплификатора Rotor Gene, для всех остальных амплификаторов маркировка пробирок на крышке недопустима! В таком случае пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.
- 1.2 Полностью разморозить заранее подготовленную смесь.
- 1.3 Из компонентов набора приготовить смесь из расчета на 1 образец.

Компонент	Количество (мкл)
Разбавитель	21
Реакционная смесь	7
Taq-полимераза	0,3

Рекомендуется готовить смесь реактивов не менее чем на 3 реакции. При приготовлении смеси необходимо все компоненты добавлять отдельно.

1.4 Перемешать амплификационную смесь пипетированием или вращением в течение 10 секунд.

1.5 Внести в подготовленные пробирки по 28 мкл полученной амплификационной смеси.

Продолжить в пункте 4.

Подготовка к проведению амплификации, варианты исполнения
набор РВ-60, TwoStep РВ-60



Фото 12. Набор реагентов «ДИПЛЕКС Mh+Us» вариант исполнения ДИПЛЕКС Mh+Us-TwoStep-PB-60. Компоненты набора.



Фото 13. Набор реагентов «ДИПЛЕКС Мh+Us» вариант исполнения ДИПЛЕКС Мh+Us-TwoStep-PB-96.

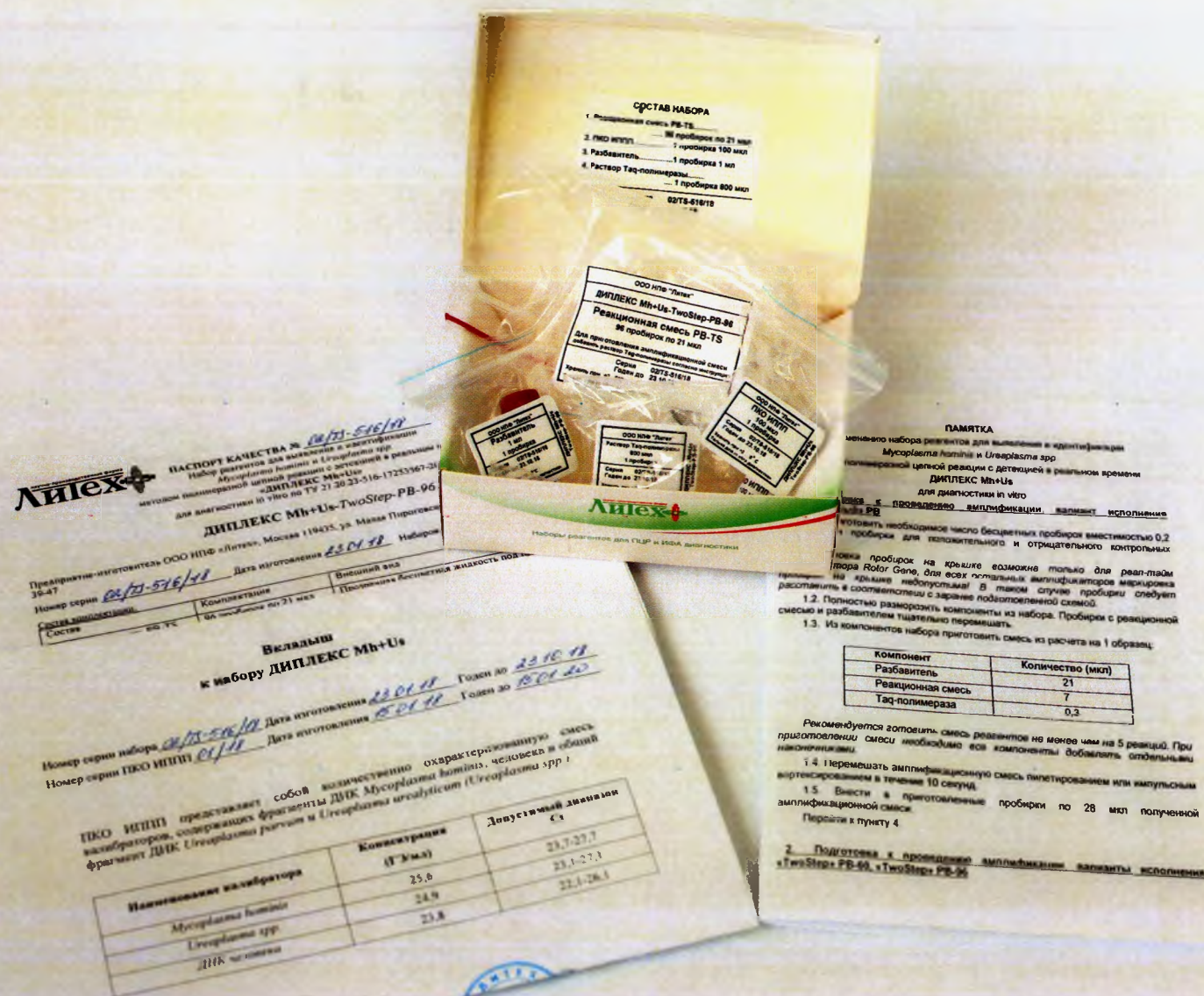


Фото 14. Набор реагентов «ДИПЛЕКС Mh+Us» вариант исполнения ДИПЛЕКС Mh+Us-TwoStep-PB-96. Комплектность набора.

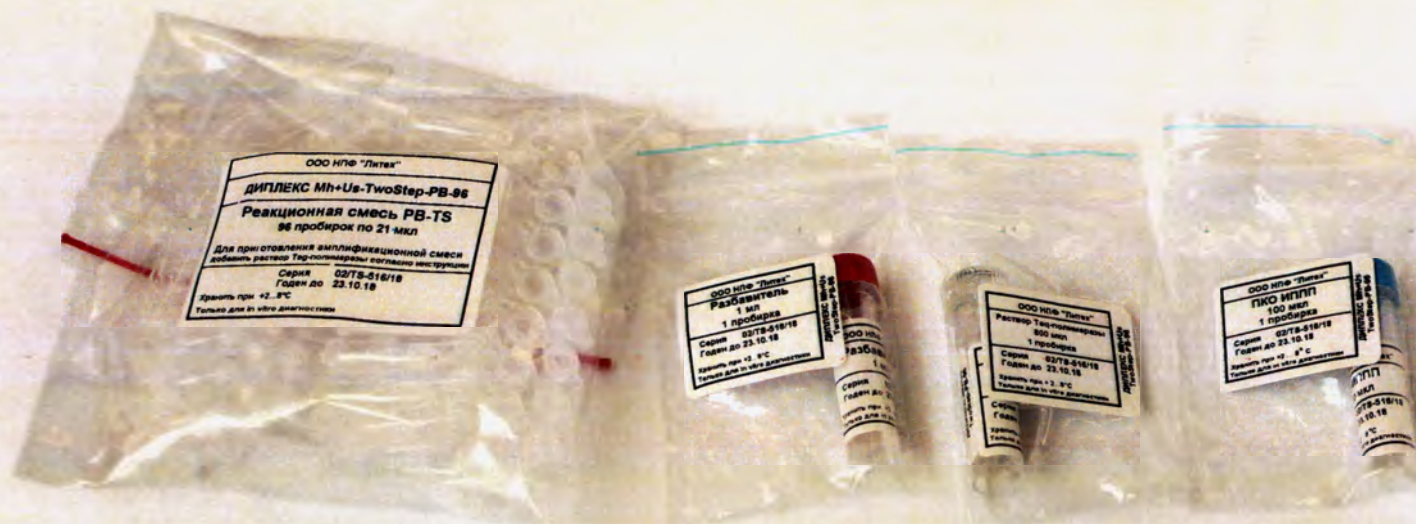


Фото 15. Набор реагентов «ДИПЛЕКС Mh+Us» вариант исполнения ДИПЛЕКС Mh+Us-TwoStep-PB-96. Компоненты набора.



Фото 16. Набор реагентов «ДИПЛЕКС Мh+Us» вариант исполнения ДИБЛЕКС Мh+Us-PB-120.
Групповая упаковка в закрытом виде.



Фото 17. Набор реагентов «ДИПЛЕКС Мh+Us» вариант исполнения ДИПЛЕКС Мh+Us-PB-120. Групповая упаковка в открытом виде.

Прошито, проверено,
скреплено печатью.

Количество листов

17 шт.

Директор

Наумов А.Ю.



Директор ООО НПО «Литех»

А.Ю.Наумов

ООО НПО «Литрекс»

Набор реагентов для выявления и идентификации
Mycoplasma hominis и *Ureaplasma spp*
методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени
ДНПЛЕКС Mh+Us
для диагностики in vitro
по ТУ 21.20.23-516-17253567-2018

ДИПЛЕКС Мh+Us -РВ-120

Маркировка набора реагентов

ООО НПО "Литек"
119434 г. Москва ул. Малая Пятковская д.1 стр.3

Набор реагентов для выявления и идентификации
Mycoplasma hominis и *Ureaplasma spp*
методом полимеразной цепной реакции
с детекцией в реальном времени

ДИПЛЕКС Mh+Us
для диагностики in vitro

ТУ 21 20 23-516-17253567-2018 РЗМ _____

ДИПЛЕКС Mh+Us+PB-120

Хранить при температуре -18...-20°C
Транспортировать при температуре +2...8°C не более 1 суток
Только для in vitro диагностики

СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционная смесь РВ.....1 пробирка 960 мкл
2. Тао-полимераза.....1 пробирка 60 мкл
3. Разбавитель.....2 пробирки по 2 мл
4. ПКО ИПП.....1 пробирка 200 мкл

Серия 01/516/18
Годен до 16.01.19

№ серии 01/516/18
годен до 16.01.19

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ "Питех"
118436 г. Москва ул. Малая Пироговская д.1 стр.3

набор реагентов для выявления и идентификации
Mycoplasma hominis и *Ureaplasma spp*
методом полимеразной цепной реакции
с детекцией в реальном времени

ДИПЛЕКС Mh+Us
для диагностики in vitro

Ту 21 20 23-516-17253567-2018 РЗН

ДИПЛЕКС Mh+Us-PB-120

Хранить при температуре -18 -20°C
Транспортировать при температуре +2 -8°C не более 1 суток
Только для in vitro диагностики

СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционная смесь РВ..... 1 пробирка 960 мкл
2. Таq-полимераза..... 1 пробирка 80 мкл
3. Разбавитель..... 2 пробирки по 2 мл
4. ПКО ИПП..... 1 пробирка 200 мкл

Серия 01/516/18
Годен до 15.01.19

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"
Реакционная смесь
960 мл
Серия 01/518/18
Годом до 15.01.19
хранить при t: 20 °C
только для in vitro диагностики

ООО ИЛФ "Литех"

Разбавитель
2 мл

Серия 01/518/18
Годеи до 15.01.19

Хранить при -18 -30 °С
Только для in vitro диагностики

ООО ИФФ "Литех"
ПКО ИППП 200 мкл 1 пробирка
Серия 01/516/18 Годен до 15.01.19 Хранить при -18...20°C Только для <u>in vitro</u> диагностики

ООО ИФФ "Литех"
ЛКО ИПП
200 мкл
Серия 01516/18
Годен до 15.01.19
Хранить при -18...20 °С
Термохром для и в-го диагностики

ДИПЛЕКС Mh+Us -OneStep-PB-60

Маркировка набора реагентов

ООО НПФ "Литех" 118438, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.1, стр.2
набор реагентов для выявления и идентификации <i>Mycoplasma hominis</i> и <i>Ureaplasma spp.</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени
ДИПЛЕКС Mh+Us для диагностики in vitro
ТУ 21 20 23-516-17253567-2018 РЗН
ДИПЛЕКС Mh+Us-OneStep-PB-60
Хранить при температуре -18...-20°C Транспортировать при температуре +2...+8°C не более 1 суток Только для in vitro диагностики

СОСТАВ НАБОРА

1. Амплификационная смесь PB-OS.....
..... 60 пробирок по 28 мкл
2. ПКО ИПП1 пробирка 100 мкл
3. Разбавитель.....1 пробирка 1 мл

№ серии 01/OS-516/18
годен до 15.05.18

Серия 01/OS-516/18
Годен до 15.05.18

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ "Литех"
Разбавитель 1 мл 1 пробирка
Серия 01/OS-516/18 Годен до 15.05.18
Хранить при -18...-20°C Только для in vitro диагностики

ДИПЛЕКС Mh+Us
OneStep-PB-60

ООО НПФ "Литех"
ПКО ИПП 100 мкл 1 пробирка
Серия 01/OS-516/18 Годен до 15.05.18
Хранить при -18...-20°C Только для in vitro диагностики

ДИПЛЕКС Mh+Us
OneStep-PB-60

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"
Разбавитель 1 мл
Серия 01/OS-516/18 Годен до 15.05.18
Хранить при -18...-20°C Только для in vitro диагностики

ДИПЛЕКС Mh+Us
OneStep-PB-60

ООО НПФ "Литех"
ПКО ИПП 100 мкл
Серия 01/OS-516/18 Годен до 15.05.18
Хранить при -18...-20°C Только для in vitro диагностики

ДИПЛЕКС Mh+Us
OneStep-PB-60

ДИПЛЕКС Mh+Us-OneStep-PB-96

Маркировка набора реагентов

ООО НПФ "Литех" 119436, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 2 Набор реагентов для выявления и идентификации <i>Mycobacterium tuberculosis</i> и <i>Ureaplasma</i> spp. методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Mh+Us для диагностики in vitro ТУ 21 20 23-518-17253567-2018 РЗН ДИПЛЕКС Mh+Us-OneStep-PB-96 Хранить при температуре -18...-20°C Транспортировать при температуре +2...+8°C не более 1 суток Только для in vitro диагностики

СОСТАВ НАБОРА

1. Амплификационная смесь PB-OS.....
..... 96 пробирок по 28 мкл
2. ПКО ИПП.....1 пробирка 100 мкл
3. Разбавитель.....1 пробирка 1 мл

№ серии 02/OS-518/18
годен до 23.05.18

Серия 02/OS-518/18
Годен до 23.05.18

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ "Литех" Разбавитель 1 мл 1 пробирка Серия 02/OS-518/18 Годен до 23.05.18 Хранить при -18...-20°C Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Mh+Us OneStep-PB-96
---	--------------------------------

ООО НПФ "Литех" ПКО ИПП 100 мкл 1 пробирка Серия 02/OS-518/18 Годен до 23.05.18 Хранить при -18...-20°C Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Mh+Us OneStep-PB-96
--	--------------------------------

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех" Разбавитель 1 мл Серия 02/OS-518/18 Годен до 23.05.18 Хранить при -18...-20°C Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Mh+Us OneStep-PB-96
--	--------------------------------

ООО НПФ "Литех" ПКО ИПП 100 мкл Серия 02/OS-518/18 Годен до 23.05.18 Хранить при -18...-20°C Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Mh+Us OneStep-PB-96
---	--------------------------------

ДИПЛЕКС Mh+Us -TwoStep-PB-60

Маркировка набора реагентов

ООО НПФ "Литех" 119436 г. Москва ул. Малая Пироговская д.1 стр.2
Набор реагентов для выявления и идентификации <i>Mycoplasma hominis</i> и <i>Ureaplasma spp</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени
ДИПЛЕКС Mh+Us для диагностики in vitro
ТУ 21.20.23-516-17253567-2018 РЗН
ДИПЛЕКС Mh+Us-TwoStep-PB-60
Хранить при температуре +2...8°C Транспортировать при температуре +2...8°C Только для in vitro диагностики

СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционная смесь PB-TS.....
..... 60 пробирок по 21 мкл
2. ПКО ИППП.....1 пробирка 100 мкл
3. Разбавитель.....1 пробирка 1 мл
4. Раствор Taq-полимеразы.....
..... 1 пробирка 500 мкл

№ серии 01/TS-516/18
годен до 15.10.18

Серия 01/TS-516/18
Годен до 15.10.18

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ "Литех"
ДИПЛЕКС Mh+Us-TwoStep-PB-60
Реакционная смесь PB-TS 60 пробирок по 21 мкл
Для приготовления амплификационной смеси добавить раствор Taq-полимеразы согласно инструкции
Серия 01/TS-516/18 Годен до 15.10.18
Хранить при +2...8°C Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
Разбавитель 1 мл 1 пробирка
Серия 01/TS-516/18 Годен до 15.10.18
Хранить при +2...8°C Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
ПКО ИППП 100 мкл 1 пробирка
Серия 01/TS-516/18 Годен до 15.10.18
Хранить при +2...8°C Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
Раствор Taq-полимеразы 500 мкл 1 пробирка
Серия 01/TS-516/18 Годен до 15.10.18
Хранить при +2...8°C Только для in vitro диагностики

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"
Разбавитель 1 мл
Серия 01/TS-516/18 Годен до 15.10.18
Хранить при +2...8°C Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
ПКО ИППП 100 мкл
Серия 01/TS-516/18 Годен до 15.10.18
Хранить при +2...8°C Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
Раствор Taq-полимеразы 500 мкл
Серия 01/TS-516/18 Годен до 15.10.18
Хранить при +2...8°C Только для in vitro диагностики

ДИПЛЕКС Mh+Us -TwoStep-PB-96

Маркировка набора реагентов

ООО НПФ "Литех" 119436 г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.1, стр.3
набор реагентов для выявления и идентификации <i>Mycoplasma hominis</i> и <i>Ureaplasma spp</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Mh+Us для диагностики in vitro ТУ 21.20.23-516-17253567-2018 РЗН
ДИПЛЕКС Mh+Us-TwoStep-PB-96
Хранить при температуре +2...8 °С Транспортировать при температуре +2...8 °С Только для in vitro диагностики

СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционная смесь PB-TS.....
..... 96 пробирок по 21 мкл
2. ПКО ИППП.....1 пробирка 100 мкл
3. Разбавитель.....1 пробирка 1 мл
4. Раствор Taq-полимеразы.....
..... 1 пробирка 800 мкл

№ серии 02/TS-516/18
годен до 23.10.18

Серия 02/TS-516/18
Годен до 23.10.18

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ "Литех"
ДИПЛЕКС Mh+Us-TwoStep-PB-96
Реакционная смесь PB-TS 96 пробирок по 21 мкл
Для приготовления амплификационной смеси добавить раствор Taq-полимеразы согласно инструкции
Серия 02/TS-516/18 Годен до 23.10.18
Хранить при +2...8 °С Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
Разбавитель 1 мл 1 пробирка
Серия 02/TS-516/18 Годен до 23.10.18
Хранить при +2...8 °С Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
ПКО ИППП 100 мкл 1 пробирка
Серия 02/TS-516/18 Годен до 23.10.18
Хранить при +2...8 °С Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
Раствор Taq-полимеразы 800 мкл 1 пробирка
Серия 02/TS-516/18 Годен до 23.10.18
Хранить при +2...8 °С Только для in vitro диагностики

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"
Разбавитель 1 мл
Серия 02/TS-516/18 Годен до 23.10.18
Хранить при +2...8 °С Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
ПКО ИППП 100 мкл
Серия 02/TS-516/18 Годен до 23.10.18
Хранить при +2...8 °С Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
Раствор Taq-полимеразы 800 мкл
Серия 02/TS-516/18 Годен до 23.10.18
Хранить при +2...8 °С Только для in vitro диагностики

Образец маркировки групповой упаковки



ООО НПФ «Литех» • +7 (495) 258-33-42 • www.litekh.ru
119435 г. Москва ул. Маршала Тухомовского д.1 стр. 3

Набор реагентов для выявления и идентификации

Mycoplasma hominis и *Ureaplasma spp.*
методом полимеразной цепной реакции
с детекцией в реальном времени
ДИПЛЕКС Mh+Us

для диагностики in vitro

ДИПЛЕКС Mh+Us-PB-120

Номер серии 02/516/18

Дата изготовления 23 января 2018 г.

Годен до 23 января 2019 г.

Число единиц потребительской упаковки _____

Масса нетто _____

Масса Брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____

Условия хранения:

Набор **ДИПЛЕКС Mh+Us-PB-120** должен храниться при температуре минус 18-20 °С в течение всего срока годности.

Условия транспортировки:

Транспортировать при температуре от плюс 2 до 8 °С в течение 5 дней (не более).

Образец маркировки групповой упаковки



Набор реагентов для выявления и идентификации

Mycoplasma hominis и *Ureaplasma spp.*

методом полимеразной цепной реакции

с детекцией в реальном времени

ДИПЛЕКС Mh+Us

для диагностики in vitro

ДИПЛЕКС Mh+Us -PB-120

Номер серии 01/516/18

Дата изготовления 15 января 2018 г.

Годен до 15 января 2019 г.

Число единиц потребительской упаковки _____

Масса нетто _____

Масса Брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____

Условия хранения:

Набор ДИПЛЕКС Mh+Us -PB-120 должен храниться при температуре минус 18-20 °С в течение всего срока годности.

Условия транспортировки:

Транспортировать при температуре от плюс 2 до 8 °С в течение 5 дней (не более).

Прошито, проверено,
скреплено печатью.

Количество листов

6 шт.

Директор

Наумов А.Ю.

